



INSTRUCTION D'INSTALLATION

INSTALLATION DE POIGNÉES AJUSTABLES EN HAUTEUR AVEC L'OUTIL FILETÉ

- i** Avant de débiter l'assemblage, assurez-vous d'avoir en main toutes les pièces nécessaires. Ces pièces doivent être commandées par l'intermédiaire de votre représentant ou par le service à la clientèle de Motion Composites. Ayez en main le numéro de série de votre fauteuil afin de faciliter la commande.

Matériel(s) requis:

- 9001285 & 9002915-STANDARD & HD PUSH HANDLES-ADJUSTABLE


Outil(s) requis:

- 9001643A-00-TOOL KIT
- 0080001A-00-OUTIL FILETÉ
- Clé Allen 5mm
- Clé dynamométrique ajustée à 7Nm

- L'outil fileté (0080001A-00) est utilisé seulement pour insérer le manchon de poignée de poussée dans la canne de dossier.



- La poignée de poussée ajustable peut s'ajuster sur 3". Chaque trou est à une distance de 1/2" l'un de l'autre.

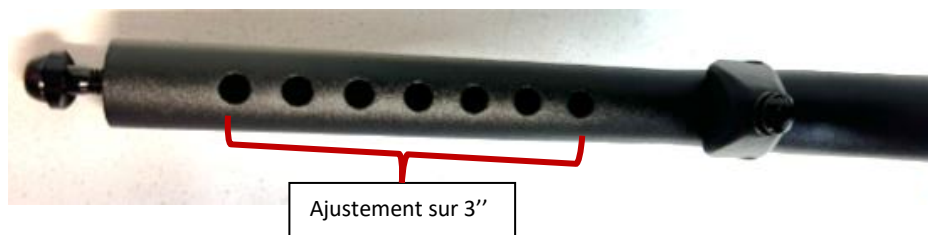



INSTRUCTION D'INSTALLATION INSTALLATION DE POIGNÉES AJUSTABLES EN HAUTEUR AVEC L'OUTIL FILETÉ

INSTALLATION

1. Insérer la poignée ajustable **dans** le manchon (0032017B-00) en enclavant les trous.



2. Insérer le dowel nut à l'intérieur de la poignée de poussée avec l'outil fileté.



3. Enclaver ensemble, à la hauteur désirée pour la poignée, le dowel nut, le manchon et la poignée de poussée.



4. Visser le dowel nut avec le manchon et la poignée de poussée avec la clé Allen de 5mm.
5. Finaliser avec la clé dynamométrique ajustée à **7Nm**.
6. Répéter les étape 1 à 5 pour l'autre poignée de poussée.