

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

POCHETTE MULTI-USAGE DÉSINFECTANTE NEWTON

INSTRUCTION POUR LE HELIO C2, HELIO A7, HELIO A6, MOVE* ET HELIO KIDS*

Matériel(s) requis :



Outil(s) requis :

Aucun

Étapes d'installation :

- Commencez par retirer l'appuie-pied du côté souhaité.
- Au dos de la pochette, vous trouverez une bande Velcro verticale avec quatre trous et une bande Velcro horizontale avec deux trous. Les sangles de positionnement peuvent être introduites à travers ces trous pour fixer la pochette au fauteuil.

Faites passer les sangles dans les trous supérieur et inférieur le long de la bande Velcro.



- Passez ensuite la troisième sangle dans le trou gauche ou droit le long de la bande horizontale.
 - Si vous installez la pochette sur l'appuie-pied gauche, faites passer la sangle dans le trou droit.



- Si vous installez sur l'appuie-pied droit, passez par la gauche.



- Tirez les trois sangles jusqu'à ce que les anneaux soient proches des bandes Velcro.



- En tenant la pochette contre l'appuie-pied, comme illustré, faites passer chaque sangle autour du tube et dans l'anneau. Attachez et appuyez chaque sangle sur elle-même.



- Remettez l'appuie-pieds sur le fauteuil roulant.



INSTRUCTION POUR LE APEX ET VELOCE

Matériel(s) requis :



Outil(s) requis :

Clé Allen 4 mm

Étapes d'installation :

1. Au dos de la pochette, vous trouverez une bande Velcro verticale avec quatre trous. Au bas de la pochette, il y a un œillet.
2. Faites passer la sangle rouge et noire dans le trou supérieur. Tirez sur la sangle pour que l'anneau se trouve le long de la bande Velcro, comme illustré.



4. Faites passer la vis à travers l'œillet dans le grand trou de l'attache de cadre. Serrez avec la clé hexagonale de 4 mm.

5.



Positionnez la pochette en position verticale. Faites passer la sangle autour du coussinet de protection et à travers l'anneau. Attachez et appuyez sur la sangle sur elle-même.

3. Retirez la vis de l'attache de cadre à l'aide de la clé Allen de 4 mm. Insérez l'attache de cadre à la base du coussinet de protection, avec son plus grand trou vers l'extérieur de la chaise, comme illustré.

