



INSTRUCTION D'INSTALLATION ASSEMBLAGE DES TIGES DE FOURCHE (HELIO A6-A7-C2-MOVE)

- i** Avant de débuter l'assemblage, assurez-vous d'avoir en main toutes les pièces nécessaires. Ces pièces doivent être commandées par l'intermédiaire de votre représentant ou par le service à la clientèle de Motion Composites. Ayez en main le numéro de série de votre fauteuil afin de faciliter la commande.

Matériel(s) requis:

- 0022172A-00 FROG LEGS PHASE-TWO FORK
- 0022153A-00 SAAF STEM BOLT STD
- 0022149A-00 STEM BOLT COVER + 1in
- 0022150A-00 STEM BOLT COVER + 2in
- 0022154A-00 SAAF STEM BOLT + 1
- 0022155A-00 SAAF STEM BOLT + 2


Outil(s) requis:

- Clé dynamométrique ajustée à 27 Nm
- Frein filet
- Clé 1 ½"



ASSEMBLAGE

1. Installer la tige de fourche dans l'étau de la façon suivante :

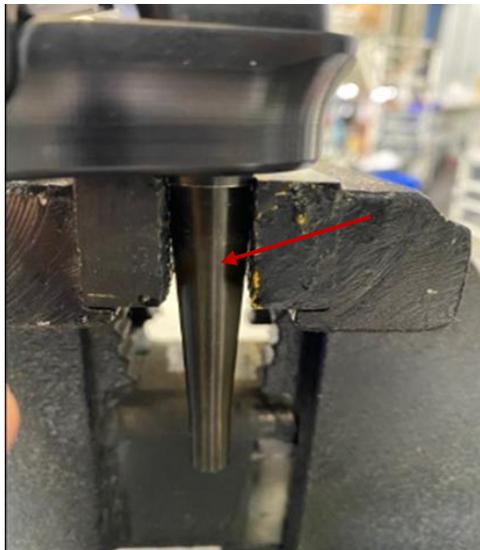

2. Mettre 1 goutte de frein filet sur la pointe de la tige et y visser le bâti de roue.





INSTRUCTION D'INSTALLATION
ASSEMBLAGE DES TIGES DE FOURCHE (HELIO A6-A7-C2-MOVE)

3. Finaliser l'assemblage avec la clé dynamométrique ajustée à 27 Nm et la clé 1 ½".

