



## INSTRUCTION D'INSTALLATION

### AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR SOL-SIÈGE A6-A7-C2-MOVE-VELOCE V.0

- i** Avant de débiter l'assemblage, assurez-vous d'avoir en main toutes les pièces nécessaires. Ces pièces doivent être commandées par l'intermédiaire de votre représentant ou par le service à la clientèle de Motion Composites. Ayez en main le numéro de série de votre fauteuil afin de faciliter la commande.

#### Matériel(s) requis:

- Fauteuils HÉLIO A6 :
  - 9002395B\_9002396B : REAR WHEEL MOUNTING PLATE REVERSIBLE
  - 9007810B-00: MOUNTING PLATE-T5
- Fauteuils MOVE:
  - 9001167\_9001168: REAR WHEEL MOUNTING PLATE-T2
- Fauteuils HÉLIO A7-C2-VELOCE:
  - 9001745\_9001747: REAR WHEEL MOUNTING PLATE V2B

#### Outil(s) requis:

- Douille de 26 mm
- Clé de 5/8"
- Clé dynamométrique ajustée à 61 Nm

#### AJUSTEMENT POUR LES FAUTEUILS HÉLIO A6-MOVE


- Dévisser complètement l'écrou avec la douille de 26 mm et déplacer l'écrou à la hauteur voulue.



- Revisser avec la douille de 26 mm et finaliser l'installation avec la clé dynamométrique ajustée à **61 Nm**.

#### AJUSTEMENT POUR LES FAUTEUILS HÉLIO A7-C2-VELOCE

- Dévisser légèrement l'écrou avec la douille de 26 mm en tenant l'écrou de l'autre côté avec la clé de 5/8" pour permettre de le déplacer à la hauteur voulue.

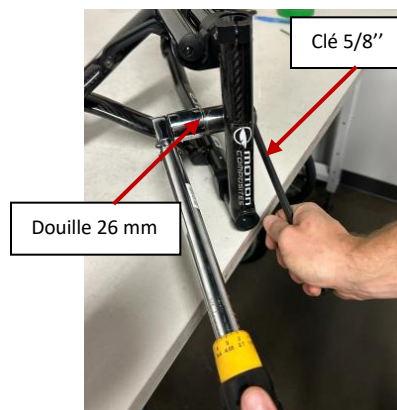

- Revisser l'écrou avec la douille de 26 mm et finaliser l'installation avec la clé dynamométrique ajustée à **61 Nm**.