





INSTRUCTION D'INSTALLATION

NETTOYAGE DES CERCEAUX DE CONDUITE NEWTON AIR GRIP

-  Cette instruction s'applique à tous les cerceaux de conduite Newton Air Grip peu importe leur taille et leur couleur.
-  **NE PAS UTILISER** d'alcool à friction, de diluant à peinture, de produit de nettoyage puissant ou abrasif, de vinaigre, de machine à pression, d'essuie-tout et de serviettes en tissu doux.

Matériel(s) requis:

- Eau chaude
- Savon à vaisselle
- 2 chiffons en microfibre

Outil(s) requis:

- Aucun

NETTOYAGE



1. Plonger un chiffon en microfibre dans l'eau chaude et bien l'essorer.
2. Mélanger approximativement 500 ml d'eau chaude avec 5 ml de savon à vaisselle.
3. Plonger le 2^e chiffon en microfibre dans l'eau savonneuse et bien l'essorer.
4. Nettoyer les cerceaux de roues avec le chiffon savonneux.
5. Retirer l'excédent d'eau et de savon avec le chiffon propre.
6. Laisser sécher à l'air libre.