



INSTRUCTION D'INSTALLATION

RÉGLAGE DU CENTRE DE GRAVITÉ DES FAUTEUILS APEX (APEX A – APEX C)



- i** Avant de débiter l'assemblage, assurez-vous d'avoir en main toutes les pièces nécessaires. Ces pièces doivent être commandées par l'intermédiaire de votre représentant ou par le service à la clientèle de Motion Composites. Ayez en main le numéro de série de votre fauteuil afin de faciliter la commande.

Matériel(s) requis:


- Tube de montage – std, droite (#901381A-00)
- Tube de montage – std, gauche (#9010382A-00)

Outil(s) requis:


- Clé Allen de 5 mm
- Clé dynamométrique ajustée à 7 Nm

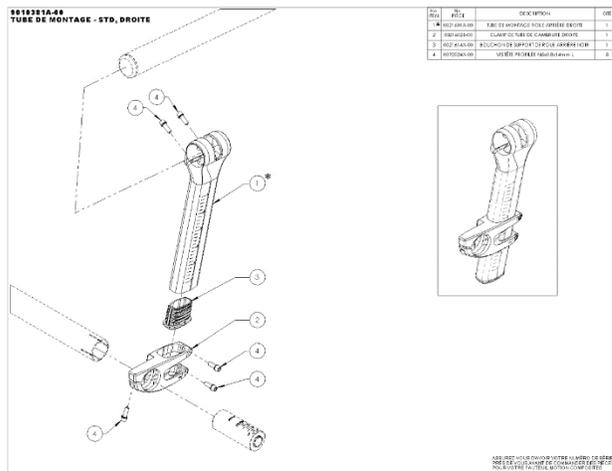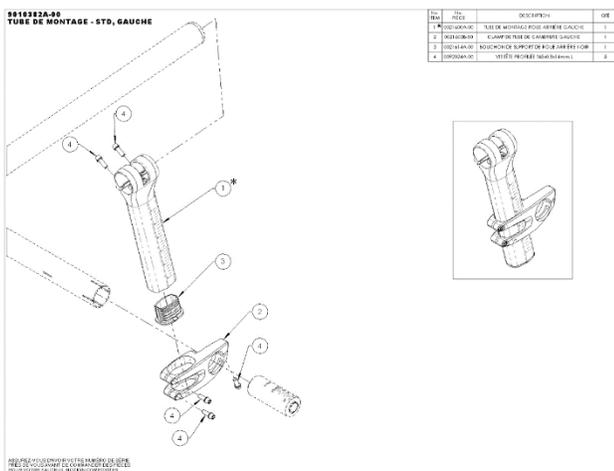

1. Retirer la roue arrière.
2. Dévisser les 2 vis du tube de montage de la roue à l'aide de la clé Allen.

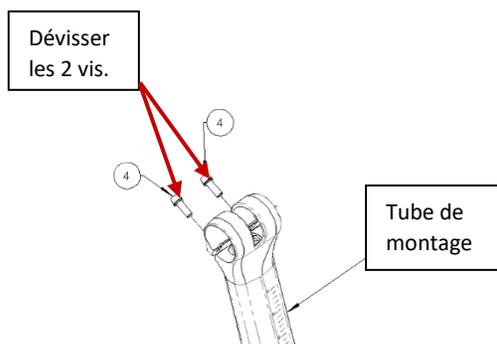

3. Utiliser 1 des 2 vis et l'insérer dans le trou fileté situé entre les 2 vis pour permettre à la bague de s'ouvrir et de déplacer le tube de montage plus facilement à l'endroit voulu.

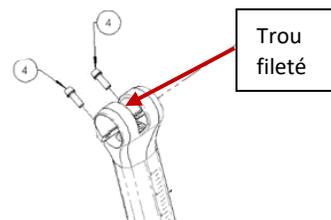

4. Retirer la vis du trou fileté et revisser à leur position d'origine les 2 vis avec la clé dynamométrique ajustée à 7 Nm en alternant d'une vis à l'autre.
5. Remettre la roue.