



INSTRUCTION D'INSTALLATION

MESURE DES CANNES DE DOSSIER POUR LES FAUTEUILS SANS DOSSIER SOUPLE POUR LA RAMQ (HELIO A6-HELIO C2-APEX A-APEX P)

- i** Les mesures des cannes de dossier se prennent de la même façon peu importe le modèle de fauteuil. C'est seulement le type de cannes de dossier qui influence la façon dont est prise la mesure.
- Avant de débiter l'assemblage, assurez-vous d'avoir en main toutes les pièces nécessaires. Ces pièces doivent être commandées par l'intermédiaire de votre représentant ou par le service à la clientèle de Motion Composites. Ayez en main le numéro de série de votre fauteuil afin de faciliter la commande.


Matériel(s) requis:

- Cannes de dossier en aluminium
 - #0032081A-00 à #00320864A-00
 - #0032085B-00 à #0032087B-00
 - #9001271A-00 à 9001274A-00
- Cannes de dossier en carbone
 - #0032073B-00 à #0032076B-00
 - #0032078B-00 à #0032080B-00
 - #9001247A-00 à #9001249A-00
 - #9001005A-00
 - #9001251A-00 - #9001252A-00
 - #9002875A-00
 - #9001253A-00 à #9001256A-00


Outil(s) requis:

- Ruban à mesurer

Cannes de dossier en aluminium

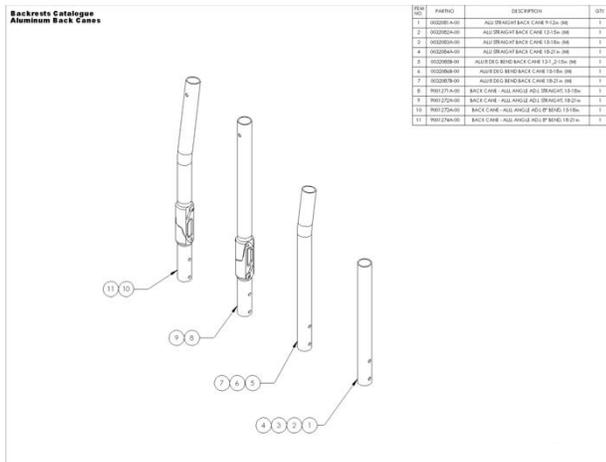

Cannes de dossier en carbone

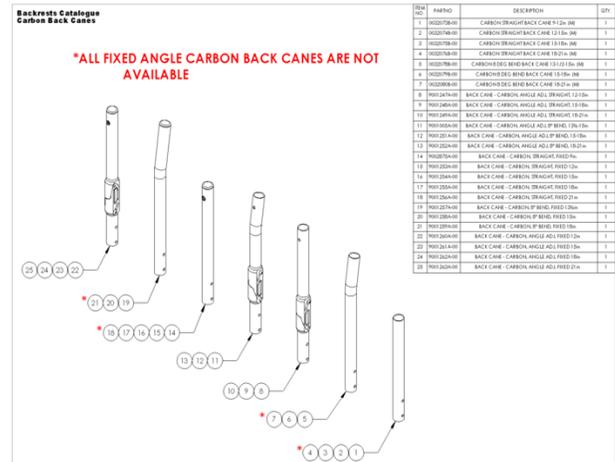




INSTRUCTION D'INSTALLATION

MESURE DES CANNES DE DOSSIER POUR LES FAUTEUILS SANS DOSSIER SOUPLE POUR LA RAMQ (HELIO A6-HELIO C2-APEX A-APEX P)

MESURE DES CANNES DE DOSSIER AJUSTABLES EN ANGLE DROITES ET À 8° (ALUMINIUM ET CARBONE)

1. Prendre la mesure du **DESSUS** de la bague de serrage jusqu'au coude de la poignée peu importe la hauteur de la canne.

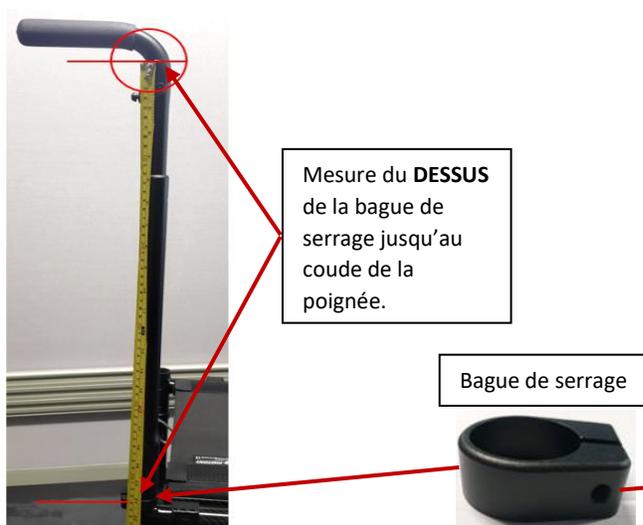

MESURE DES CANNES DE DOSSIER PAS AJUSTABLES EN ANGLE DROITES ET SANS POIGNÉES (ALUMINIUM ET CARBONE)

1. Prendre la mesure du **DESSOUS** de la bague de serrage jusqu'au coude de la poignée peu importe la hauteur de la canne.



2. Prendre la mesure du **DESSOUS** de la bague de serrage jusqu'à la base du bouchon peu importe la hauteur de la canne.

