





FICHE D'INSTRUCTIONS

INSTALLATION/AJUSTEMENT DE LA CEINTURE DE POSITIONNEMENT

-  Les ceintures de positionnement décrites ci-dessous ne sont PAS approuvées RESNA WC-4 :2017 et ISO 7176-19 :2019. Elles ne doivent en aucun cas être utilisées comme ceinture de sécurité lors du transport dans un véhicule motorisé.
-  Avant de débiter l'assemblage, assurez-vous d'avoir en main toutes les pièces nécessaires. Ces pièces doivent être commandées par l'intermédiaire de votre représentant ou par le service à la clientèle de Motion Composites. Ayez en main le numéro de série de votre fauteuil afin de faciliter la commande.


Matériel(s) requis:

- 1 ceinture de positionnement (type auto/avion ou type Velcro)

Outil(s) requis:

- 2 bagues #60500
- 2 vis #90665
- Clé Allen de 4 mm

INSTALLER/ENLEVER LA CEINTURE DE POSITIONNEMENT

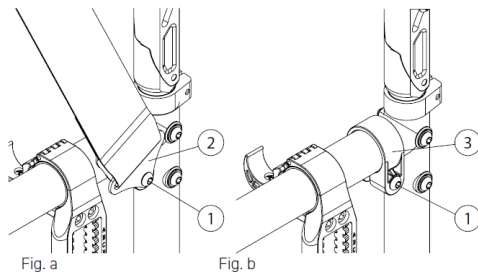

1. Enlever la vis (1) pour détacher l'ancrage de la ceinture de positionnement (Fig. a).
2. Réinstaller la vis (1) directement au même endroit sur la bague (3) de la (Fig. b).
3. Répéter les étapes 1 et 2 de l'autre côté.
4. Serrer fermement la vis à l'aide de la clé Allen lors de l'installation de la ceinture.

1. Pour l'attacher, insérer la boucle dans l'attache jusqu'à ce qu'elle soit bloquée.
2. Pour la détacher, lever l'attache sur la ceinture de type avion **OU** appuyer sur le bouton pour le type auto.
3. Pour l'ajuster, tirer sur chaque extrémité de la ceinture vers les côtés jusqu'à l'obtention de la tension désirée en gardant la boucle bien centrée.

AJUSTEMENT DE LA CEINTURE DE TYPE VELCRO

1. Pour l'attacher, passer un côté de la ceinture dans la boucle.
2. Placer l'autre côté de la ceinture par-dessus et appliquer une pression pour que le Velcro s'agrippe fermement.

AJUSTEMENT DE LA CEINTURE DE TYPE AVION OU DE TYPE AUTO

