



## INSTRUCTION D'INSTALLATION CHANGEMENT DU CERCEAU DE ROUE (SANS ENLEVER LE PNEU)

- i** • Compatible avec les roues Newton One
- Avant de débiter l'assemblage, assurez-vous d'avoir en main toutes les pièces nécessaires. Ces pièces doivent être commandées par l'intermédiaire de votre représentant ou par le service à la clientèle de Motion Composites. Ayez en main le numéro de série de votre fauteuil afin de faciliter la commande.

### Matériel(s) requis:

- 1 cerceau de roue

### Outil(s) requis:

- Clé Allen de 4 mm

1. Placer la roue sur une surface de façon à ne pas égratigner la peinture.
2. Dévisser toutes les vis du cerceau de roue.



3. Changer le cerceau de roue en alignant bien les trous avec ceux de la roue.
4. Revisser toutes les vis complètement.