





INSTRUCTION D'INSTALLATION

INSTALLATION DU SIÈGE RIGIDE EN ALUMINIUM AMOVIBLE POUR FAUTEUILS PLIANTS ET RIGIDES (RAMQ)

-  Porter une attention particulière à l'orientation des ancrages des sièges rigides amovibles 0005309A-00 ainsi qu'au côté sur lequel ils sont appliqués par rapport au siège rigide 0007998A-XX.
-  Avant de débiter l'assemblage, assurez-vous d'avoir en main toutes les pièces nécessaires. Ces pièces doivent être commandées par l'intermédiaire de votre représentant ou par le service à la clientèle de Motion Composites. Ayez en main le numéro de série de votre fauteuil afin de faciliter la commande.

Matériel(s) requis:



- Pour les fauteuils pliants (0005915A-XX)
- Pour les fauteuils rigides (0005935A-XX & 0006961A-XX)

Outil(s) requis:

- 1 X 0007998A-XX siège rigide aluminium amovible
 - 8 X 0090989A-00 écrou autobloquant mince (M5X0.8)
 - 8 X 0090647A-00 vis tête bombée (M5X0.8X18MM L)
 - 4 X 0005309A-00 ancrage siège rigide amovible
 - Clé Allen de 4 mm
 - Clé dynamométrique ajustée à 4.5 Nm
 - 1 X 0008540A-00 ensemble de Velcro crochet autoadhésif (fourni au client)
-
- 8 X 0090664A-00 vis tête bombée (M6X1X30MM)
 - 4 X 0051119A-00 bague aluminium universelle 1.25"
 - 1 X 007989A_0007990A siège rigide aluminium fixe
 - Clé Allen de 5 mm
 - Clé dynamométrique ajustée à 7 Nm
 - 1 X 0008540A-00 ensemble de Velcro crochet autoadhésif (fourni au client)

INSTALLATION POUR LES FAUTEUILS PLIANTS

- Lorsque l'endos du siège rigide nous fait face, les trous pour le positionnement des ancrages seront ovales vers la gauche et ronds vers la droite.

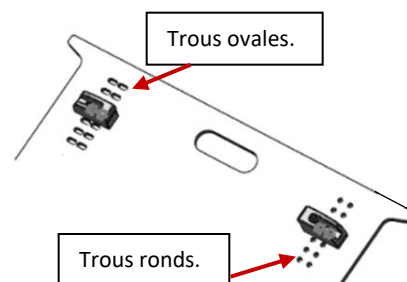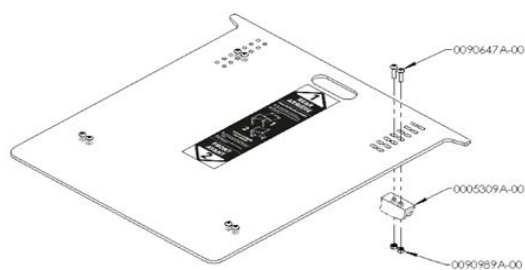




INSTRUCTION D'INSTALLATION

INSTALLATION DU SIÈGE RIGIDE EN ALUMINIUM AMOVIBLE POUR FAUTEUILS PLIANTS ET RIGIDES (RAMQ)

1. Installer les ancrages sur le dos du siège amovible à l'aide de la clé Allen. Leur position peut varier selon l'emplacement de la plaque de montage de la roue arrière et le l'emplacement des accessoires.

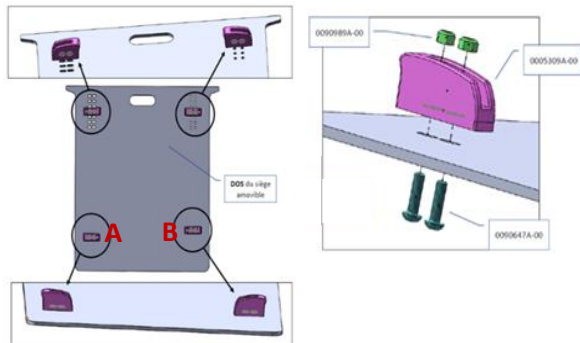


2. Finaliser l'installation avec la clé dynamométrique ajustée à 4.5 Nm.
3. Installer les Velcro sur le siège amovible rigide correspondant à leur emplacement sous le coussin.

- Les ancrages du haut (A et B) doivent être compatibles avec les bagues des supports de longeron du fauteuil HELIO C2. Déplacer les bagues de support de longeron afin qu'elles soient juste devant les ancrages avant (A et B) pour empêcher le siège rigide de glisser vers l'avant.

INSTALLATION POUR FAUTEUILS RIGIDES

1. Fixer les ancrages selon l'espace disponible dépendamment de la configuration du fauteuil à l'aide de la clé Allen.

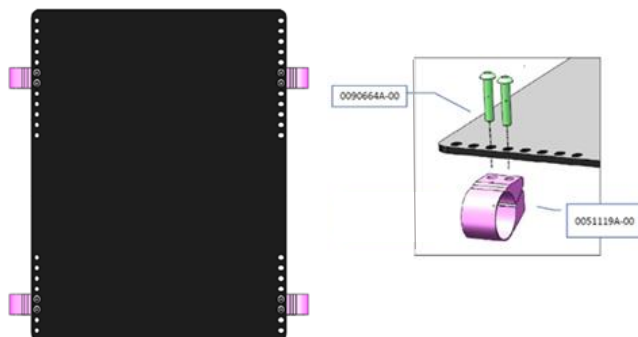

2. Finaliser l'installation avec la clé dynamométrique ajustée à 7 Nm.
3. Installer les Velcro sur le siège amovible rigide correspondant à leur emplacement sous le coussin.