



INSTRUCTION D'INSTALLATION

INSTALLATION D'APPUI-BRAS EN « T » ET EN « U » AVEC LE RÉCEPTACLE EN 3 MORCEAUX (HELIO A7 - HELIO C2 – VELOCE - APEX)



- Pour les fauteuils APEX A et APEX C, l'appui-bras en « U » n'est pas disponible.



- L'installation est la même pour les fauteuils pliants et rigides.
- La majorité des étapes d'installation sont les mêmes pour les appui-bras en « T » et en « U ».
- Avant de débiter l'assemblage, assurez-vous d'avoir en main toutes les pièces nécessaires. Ces pièces doivent être commandées par l'intermédiaire de votre représentant ou par le service à la clientèle de Motion Composites. Ayez en main le numéro de série de votre fauteuil afin de faciliter la commande.

Matériel(s) requis:

- 2 X Réceptacle d'appui-bras V3 (#0004111A-00)
- 1 X appui-bras - type T & U, droite - 8-12 po (#9001299B_9001300B) **OU**
- 1 X appui-bras - type T & U, droite - 10-14 po (9001301B_9001302B)
- 1 X appui-bras - type T & U, gauche - 8-12 po (#9001303B_9001304B) **OU**
- 1 X appui-bras - type T & U, gauche - 10-14 po (#9001305B_9001306B)
- 1 X structure-garniture std, droite (#9010394B_9010397B)
- 1 X structure-garniture std, gauche (#9010398B_9010401B)
- 1 X pivot arrière, droite (#9001313A-00)
- 1 X pivot arrière, gauche (#9001314A-00)

Outil(s) requis:

- Ruban à mesurer
- Clé Allen de 2 mm
- Clé Allen de 4 mm
- Clé dynamométrique ajustée à 7 Nm.

INSTALLATION DU RÉCEPTACLE

0004111A-00
RÉCEPTACLE APPUI BRAS V3

1. Appuyer le réceptacle de l'appui-bras sur le cadre du fauteuil et insérer les 2 attaches dans leur rail sans les visser.

N° ITEM	N° PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	000764A-00	RÉCEPTACLE APPUI BRAS V3 BASE	1
2	0003173A-00	BAGUE APPUI BRAS V3 ATTACHE	2
3	0002112A-00	CHEMISE BAGUE U ET APPUI BRAS V2	2
4	009074B-00	VIS TÊTE CYLINDR M5x0.8x18mm L	2

3. Insérer les 2 chemises dans le réceptacle.

2. Bien aligner l'emplacement des vis du réceptacle et des attaches et y visser **légèrement** les 2 vis de 4 mm à l'aide de la clé Allen.

4. À l'aide de la clé Allen de 2 mm, visser les 4 vis correspondantes du réceptacle pour avoir une bonne tension afin de bien retenir l'appui-bras (sans ballottage) tout en étant capable de le retirer facilement.



INSTRUCTION D'INSTALLATION

INSTALLATION D'APPUI-BRAS EN « T » ET EN « U » AVEC LE RÉCÉPTACLE EN 3 MORCEAUX (HELIO A7 - HELIO C2 – VELOCE - APEX)

5. * Pour l'**appui-bras en T**, positionner le réceptacle à 6 pouces du coin entre le siège et le dossier.




6. En ajustant la tension des vis de 4 mm avec la clé Allen, s'assurer que l'appui-bras est parallèle au dossier.




- * Pour l'**appui-bras en U**, descendre l'appui-bras et positionner le réceptacle pour que l'appui-bras puisse s'y insérer.

7. Finaliser l'installation avec la clé dynamométrique ajustée à 7 Nm.

INSTALLATION DU COUSSIN DE L'APPUI-BRAS

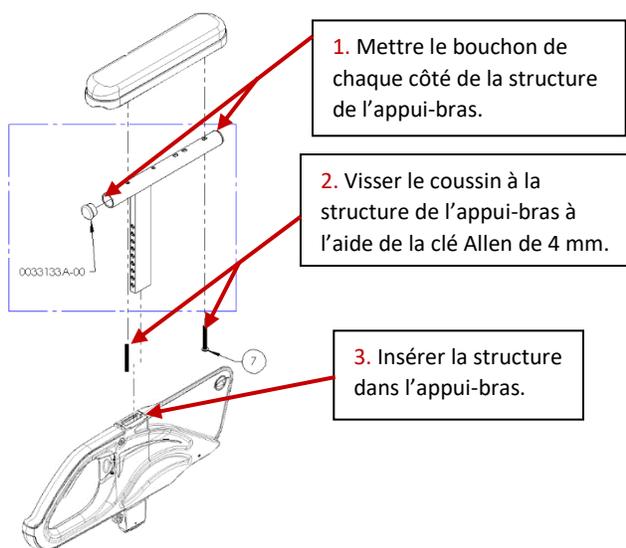

INSTALLATION DU PIVOT DE L'APPUI-BRAS EN U

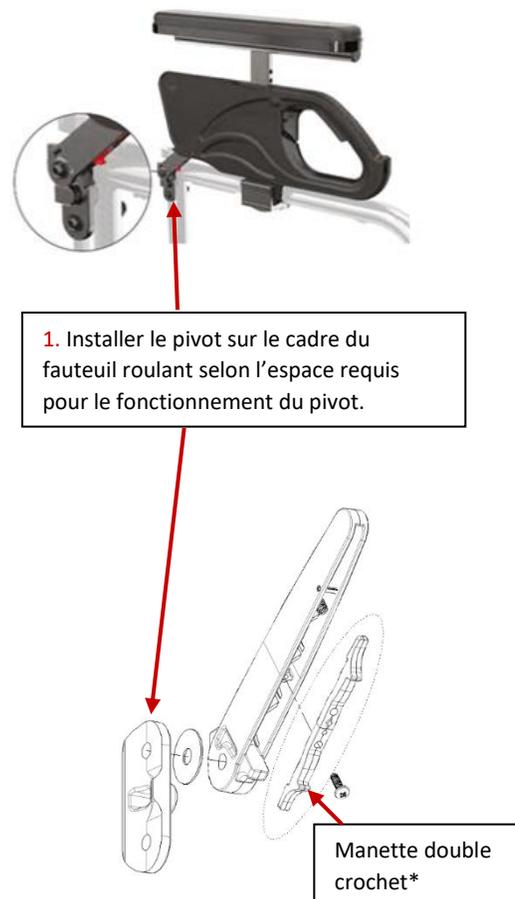



INSTRUCTION D'INSTALLATION

INSTALLATION D'APPUI-BRAS EN « T » ET EN « U » AVEC LE RÉCEPTACLE EN 3 MORCEAUX (HELIO A7 - HELIO C2 – VELOCE - APEX)

* La manette double crochet peut s'installer de 2 façons différentes : amovible et fixe.

