

FICHE D'INSTRUCTIONS

ANTI-BASCULANT PIVOTANT

- Motion Composites recommande fortement l'utilisation d'anti-basculant.
- Avant de débiter l'assemblage, assurez-vous d'avoir en main toutes les pièces nécessaires. Ces pièces doivent être commandées par l'intermédiaire de votre représentant ou par le service à la clientèle de Motion Composites. Ayez en main le numéro de série de votre fauteuil afin de faciliter la commande.


COMPATIBLE AVEC LES FAUTEUILS VELOCE, HELIO C2, HELIO A7, HELIO A6 ET MOVE

Matériel(s) requis :

- Système anti-basculant pivotant (# 9007930A-00)

Outil(s) requis :

- Clé Allen de 4 mm
- Clé Allen de 5 mm
- Clé dynamométrique ajustée à 7 Nm et à 12 Nm

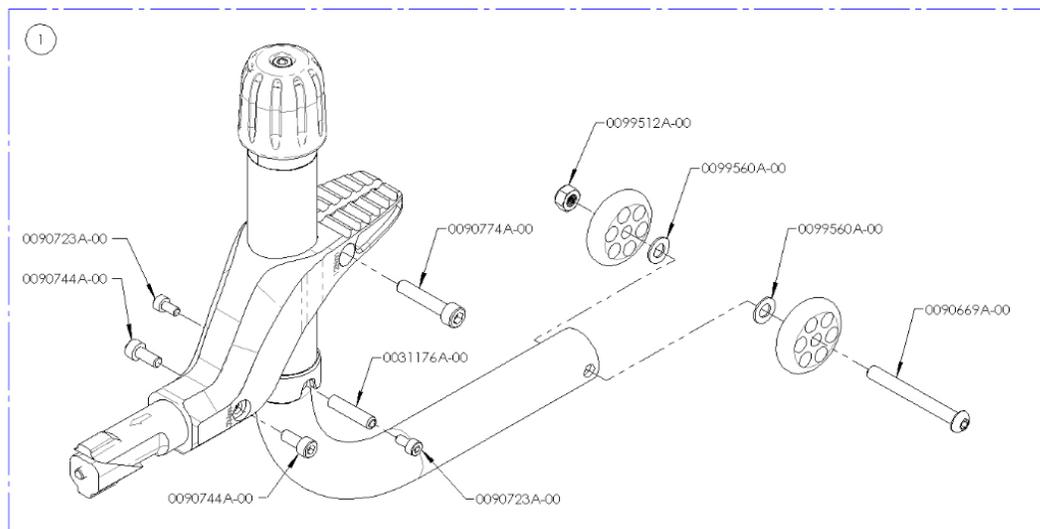


INSTALLATION

1. S'il est commandé avec le fauteuil roulant, la cale sera déjà installée à l'arrière du cadre. Si tel est le cas, passez à l'étape 3.
2. Tout en gardant le mot « TOP » vers le haut et les surfaces planes perpendiculaires au sol, insérez la cale aussi loin que possible dans l'arrière du cadre du fauteuil roulant.

Sinon, retirez les vis de chaque côté du support en Z. Utilisez la clé Allen de 4 mm. Ensuite, retirez la cale.

Finaliser avec la clé dynamométrique ajustée à 7 Nm.

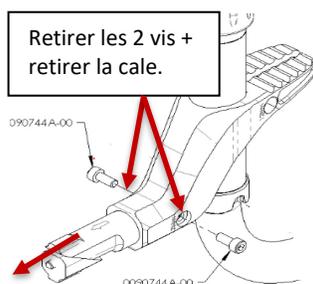

- Rattachez le support en Z de l'anti-basculé escamotable avec les 2 vis de l'étape #1.

Finaliser avec la clé dynamométrique ajustée à 7 Nm.



- Pour calibrer l'anti-basculé pour l'utilisateur, desserrez la vis sur le support en Z pour effectuer le réglage de la hauteur.

Ensuite, serrez à 12 Nm. Le tube anti-basculé doit s'aligner avec le tube du cadre.



L'anti-basculé doit être de 1½ po à 2 po (3,8 cm à 5,1 cm) du sol.

BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE POUR ATTEINDRE LA HAUTEUR SOUHAITÉE ?

- Retirez soigneusement la vis en haut de l'anti-basculant pivotant. Surveillez le ressort sous le capuchon et le tube plié qui sera libéré.
- Desserrez la vis du support en Z pour faire glisser le support en Z vers le haut hors du tube extérieur.
- Inversez le support Z pour que le texte « 7Nm » soit vers le haut et remplacez-le dans le tube extérieur.
- Remplacez la vis, avec le ressort en place sous le capuchon. Le capuchon doit s'insérer dans l'insert du tube.
- Faire les étapes 3 et 4 de la section précédente.

