



## INSTRUCTION D'INSTALLATION INSTALLATION DES AUTOCOLLANTS RÉFLÉCHISSANTS

- i** • S'assurer que la surface du cadre utilisée soit bien propre avant l'application des autocollants.

COMPATIBLE AVEC TOUS LES FAUTEUILS

Matériel(s) requis:

- 4 autocollants blancs (#0051328A-00)
- 2 autocollants rouges (0051328A-01)

Outil(s) requis:

- Aucun

### INSTALLATION DES AUTOCOLLANTS BLANCS SUR LES APPUI-PIEDS

1. Un autocollant doit être apposé sur l'avant de l'appui-pied de chaque côté.



2. Pour les modèles HELIO, un autocollant doit être apposé dans le haut de la courbe du cadre de chaque côté.



### INSTALLATION DES AUTOCOLLANTS BLANCS SUR LES CÔTÉS DU CADRE

1. Pour les modèles APEX, un autocollant doit être apposé le plus haut possible à l'extérieur du cadre de chaque côté.



### INSTALLATION DES AUTOCOLLANTS ROUGES

1. Un autocollant doit être apposé derrière le bâti du fauteuil de chaque côté.

