



INSTRUCTION D'INSTALLATION INSTALLATION D'UN DOSSIER À TENSION AJUSTABLE (APEX A/APEX C)

- i** Avant de débuter l'assemblage, assurez-vous d'avoir en main toutes les pièces nécessaires. Ces pièces doivent être commandées par l'intermédiaire de votre représentant ou par le service à la clientèle de Motion Composites. Ayez en main le numéro de série de votre fauteuil afin de faciliter la commande.


Matériel(s) requis:

- Toile de siège cadre rigide à crochet (#9003678A_9003798A)

Outil(s) requis:

- Clé Allen de 4 mm

9008165A, 9008229A
DTR ACTIVE-MESH V2

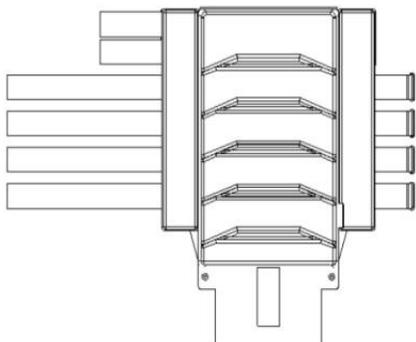


Sangles de remplacement pour dossier

| Sangles Hautes | | Sangles Basses | | Oreillette |
|----------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 par Dossier | | Qté selon hauteur du dossier | | 1 par Dossier |
| No. Item | Largeur de dossier po (cm) | No. Item | Largeur de dossier po (cm) | No. Item |
| 0063110A-00 | 12-13 (30.5-33) | 0063117A-00 | 12-13 (30.5-33) | 0063124A-00 |
| 0063111A-00 | 14-15 (35.6-38.1) | 0063118A-00 | 14-15 (35.6-38.1) | |
| 0063112A-00 | 16-17 (40.6-43.2) | 0063119A-00 | 16-17 (40.6-43.2) | |
| 0063113A-00 | 18-19 (45.7-48.3) | 0063120A-00 | 18-19 (45.7-48.3) | |
| 0063114A-00 | 20-21 (50.8-53.3) | 0063121A-00 | 20-21 (50.8-53.3) | |
| 0063115A-00 | 22 (55.9) | 0063122A-00 | 22 (55.9) | |

Tous les dossiers ont le nombre appropriés de sangles

| DOSSIER SOUPLE À TENSION RÉGLABLE ACTIVE-MESH V2 | LONGUEUR en pouces (cm) | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 9-12 (22.9-30.5) | 12-15 (30.5-38.1) | 15-18 (38.1-45.7) | 18-21 (45.7-53.3) | 21-24 (53.3-60.9) | |
| # DE SANGLES INCLUSES | 1 Sangle | 2 Sangles | 3 Sangles | 4 Sangles | 5 Sangles | |
| LARGEUR en pouces (cm) | 12 (30.5) | 9008165A-00 | 9008166A-00 | 9008167A-00 | 9008168A-00 | 9008169A-00 |
| | 13 (33.0) | 9008170A-00 | 9008171A-00 | 9008172A-00 | 9008173A-00 | 9008174A-00 |
| | 14 (35.6) | 9008175A-00 | 9008176A-00 | 9008177A-00 | 9008178A-00 | 9008179A-00 |
| | 15 (38.1) | 9008180A-00 | 9008181A-00 | 9008182A-00 | 9008183A-00 | 9008184A-00 |
| | 16 (40.6) | 9008185A-00 | 9008186A-00 | 9008187A-00 | 9008188A-00 | 9008189A-00 |
| | 17 (43.2) | 9008190A-00 | 9008191A-00 | 9008192A-00 | 9008193A-00 | 9008194A-00 |
| | 18 (45.7) | 9008195A-00 | 9008196A-00 | 9008197A-00 | 9008198A-00 | 9008199A-00 |
| | 19 (48.3) | 9008200A-00 | 9008201A-00 | 9008202A-00 | 9008203A-00 | 9008204A-00 |
| | 20 (50.8) | 9008205A-00 | 9008206A-00 | 9008207A-00 | 9008208A-00 | 9008209A-00 |
| | 21 (53.3) | 9008210A-00 | 9008211A-00 | 9008212A-00 | 9008213A-00 | 9008214A-00 |
| | 22 (55.9) | 9008215A-00 | 9008216A-00 | 9008217A-00 | 9008218A-00 | 9008219A-00 |

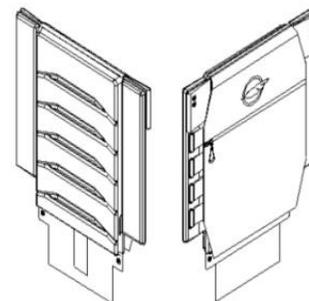

| ex: 9008165A-00 (Dossier avec sangles) | |
|--|--|
| ex: 0062165B-00 (Dossier seulement) | |
| Instance | # Patch Velcro à Boucles pour écussons |
| -00 | Aucun |
| -01 | 1 patch Velcro |
| -02 | 2 patchs velcro |
| -03 | 3 patchs velcro |
| -04 | 4 patchs velcro |
| -05 | 5 patchs velcro |
| -06 | 6 patchs velcro |



INSTRUCTION D'INSTALLATION

INSTALLATION D'UN DOSSIER À TENSION AJUSTABLE (APEX A/APEX C)

INSTALLATION

Le nombre de sangles du dossier dépend de son format :

- 9 à 12 pouces : 1 sangle
- 12 à 15 pouces : 2 sangles
- 15 à 18 pouces : 3 sangles
- 18 à 21 pouces : 4 sangles

* Cette instruction a été faite avec un dossier à 4 sangles mais la procédure est la même pour tous les dossiers.

1. Dévisser et retirer les poignées de poussée à l'aide de la clé Allen de 4 mm (au besoin).



2. Pour chacune des sangles, vous devez insérer la sangle dans l'œillet en conservant la partie en velcro vers l'extérieur.



3. Insérer les sangles sur la canne de dossier de gauche. Assurez-vous que le velcro soit face à vous.



4. Ajuster la sangle double à la largeur du fauteuil.



5. Installer les poignées de poussée et vissez-les à la sangle double de chaque côté.




6. Soulever la partie rabattable du dossier de chaque côté.



7. Installer le dossier de façon à ce que les velcros du dossier se collent aux velcros de la sangle double.



8. Insérer les sangles dans les ganses à gauche du dossier et les rattacher à la canne de dossier de droite.

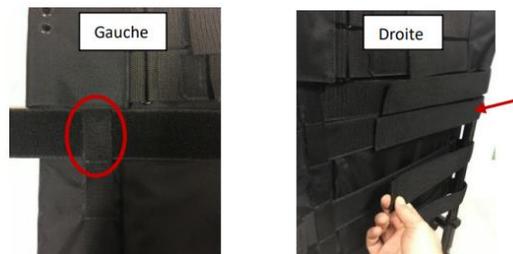



INSTRUCTION D'INSTALLATION

INSTALLATION D'UN DOSSIER À TENSION AJUSTABLE (APEX A/APEX C)

9. Serrer les sangles sur le velcro derrière le fauteuil comme désiré.

! ATTENTION DE NE PAS TROP SERRER LES SANGLES : RISQUE D'ENDOMMAGER LES CANNES DE DOSSIER.

10. Rabattre le panneau du dossier.

