



INSTRUCTION D'INSTALLATION

Installation d'attache-câbles (tie-wraps) sur le dossier souple

- i** Avant de débuter l'assemblage, assurez-vous d'avoir en main toutes les pièces nécessaires. Ces pièces doivent être commandées par l'intermédiaire de votre représentant ou par le service à la clientèle de Motion Composites. Ayez en main le numéro de série de votre fauteuil afin de faciliter la commande.

Matériel(s) requis:

- 2 X attache-câble (#0011489A-00)

Outil(s) requis:

- Aucun

INSTALLATION

1. Serrer **UN PEU** l'attache-câble de chaque côté **EN ALTERNANT** à gauche et à droite afin de garder la toile du dossier sans pli et droite jusqu'à la tension voulue.



- Serrer, avec la même tension, l'attache de gauche et de droite.



2. Couper l'excédent **le plus près possible** de l'attache afin d'éviter un frottement sur la toile.

