





INSTRUCTION D'INSTALLATION INSTALLATION D'UN SIÈGE À TENSION AJUSTABLE (APEX A-APEX C-APEX P)

-  On doit toujours installer le maximum de sangles sur le fauteuil et conserver celles restantes en cas d'une future modification du fauteuil (voir les tableaux ci-dessous).
- SI LE NOMBRE DE SANGLES MINIMAL NE PEUT ÊTRE INSTALLÉ, RETIRER UN OU DES ACCESSOIRES.
-  Les toiles d'assise de 10" et 11" de profondeur sont incompatibles avec les appui-bras en T et les protège-vêtements.
- Avant de débiter l'assemblage, assurez-vous d'avoir en main toutes les pièces nécessaires. Ces pièces doivent être commandées par l'intermédiaire de votre représentant ou par le service à la clientèle de Motion Composites. Ayez en main le numéro de série de votre fauteuil afin de faciliter la commande.

Profondeur du siège	Nombre de sangles livrées
10po	4
11po	4
12po	4
13po	5
14po	5
15po	6
16po	7
17po	8
18po	9
19po	10
20po	11

Profondeur du siège	Nombre de sangles minimum installées
10po	3
11po	3
12po	3
13po	4
14po	4
15po	5
16po	6
17po	7
18po	7
19po	8
20po	9

Matériel(s) requis:

- 1 X kit sangle de siège 1" – assy (#9008113A)

Outil(s) requis:

- Aucun

INSTALLATION

1. Insérer la sangle dans les bagues de chaque côté du Velcro.



- Il est important de s'assurer que la sangle soit insérée correctement dans les fentes de la bague.




2. Installer les bagues (avec les sangles) sur les supports de longeron du fauteuil à tous les endroits où l'espace requis le permet.
3. Passer la sangle dans l'œillet du côté opposé.





INSTRUCTION D'INSTALLATION
INSTALLATION D'UN SIÈGE À TENSION AJUSTABLE
(APEX A-APEX C-APEX P)

4. Passer la sangle dans l'œillet du côté opposé.

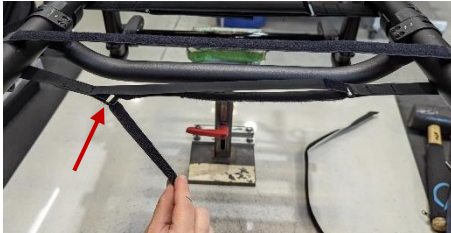

5. Ajuster la sangle à la tension voulue et appuyer sur le Velcro.



6. Appliquer la toile du siège sur le Velcro.