


MONTANT DE DOSSIER (Apex en Carbone seulement)

1. À l'aide d'un tournevis plat, retirez le **PROTECTEUR PLASTIQUE POUR DE RAIDISSEUR DE DOSSIER CARBONE**

Une fois décollé, vous pouvez l'enlever à la main.

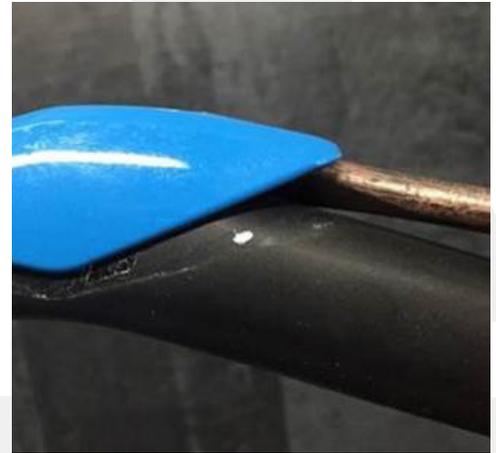

2. Pour la colle qui est encore sur le carbone, vous pouvez facilement enlever la grande majorité en la roulant avec vos pouces.



3. Utilisez un tampon d'alcool isopropylique pour enlever les morceaux de colle qui peuvent rester sur le carbone ainsi que pour le nettoyer.



PROTECTEUR DE CADRE EN PLASTIQUE (Apex en Carbone seulement)

1. Utilisez un tournevis plat pour décoller le **PROTECTEUR DE CADRE EN PLASTIQUE**. Une fois décollé, vous pouvez l'enlever à la main.



2. Pour la colle qui est encore sur le carbone, vous pouvez facilement enlever la grande majorité en la roulant avec vos pouces.



3. Utilisez un tampon d'alcool isopropylique pour enlever les morceaux de colle qui peuvent rester sur le carbone ainsi que pour le nettoyer.



PROTECTEUR DE PLASTIQUE DE POTENCE APEX (Apex en Carbone & Aluminium)

1. Utilisez un tournevis plat pour décoller le **PROTECTEUR DE PLASTIQUE DE POTENCE APEX**. Une fois enlevé, vous pouvez l'enlever à la main.

2. Pour la colle qui est encore sur le carbone, vous pouvez facilement enlever la grande majorité en la roulant avec vos pouces.

3. Utilisez un tampon d'alcool isopropylique pour enlever les morceaux de colle qui peuvent rester sur le carbone ainsi que pour le nettoyer.



COUSSIN EN MOUSSE POUR LE DEVANT DU CADRE EN CARBONE (Apex en Carbone Seulement)

1. À l'aide d'un tournevis plat, retirez le **COUSSIN EN MOUSSE POUR LE DEVANT DU CADRE EN CARBONE**.

Une fois enlevé, vous pouvez l'enlever à la main.

a. Le tampon en mousse est difficile à enlever vous aurez peut-être besoin de répéter l'étape #1 plusieurs fois.

2. Pour la colle qui est encore sur le carbone, vous pouvez facilement enlever la grande majorité en la roulant avec vos pouces.



- 3.** Utilisez un tampon d'alcool isopropylique pour enlever les morceaux de colle qui peuvent rester sur le carbone ainsi que pour le nettoyer
- a.** Si nécessaire, faites rouler la bande avec les pouces après avoir utilisé un tampon d'alcool isopropylique.

