



CATALOGUE DE PIÈCES


APEX A

APEX P




9003232B 9003239B
CADRE RIGIDE - ALUMINIUM (SPÉCIFIER
PROFONDEUR ASSISE & HSS AVANT)

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9003232-00	9003233-00	9003234-00	9003235-00	9003236-00	9003237-00	9003238-00	9003239-00
1	0010773B-00	TUBE CADRE RIGIDE ALUMINIUM 70 DEG	1	-	-	-	-	-	-	-
2	0010680B-00	TUBE CADRE RIGIDE ALUMINIUM 75 DEG	-	1	-	-	-	-	-	-
3	0010681B-00	TUBE CADRE RIGIDE ALUMINIUM 80 DEG	-	-	1	-	-	-	-	-
4	0010682B-00	TUBE CADRE RIGIDE ALUMINIUM 85 DEG	-	-	-	1	-	-	-	-
5	0010683B-00	TUBE CADRE RIGIDE ALUMINIUM 90 DEG	-	-	-	-	1	-	-	-
6	0010684B-00	TUBE CADRE RIGIDE ALUMINIUM 95 DEG	-	-	-	-	-	1	-	-
7	0010685B-00	TUBE CADRE RIGIDE ALUMINIUM 100 DEG	-	-	-	-	-	-	1	-
8	0010686B-00	TUBE CADRE RIGIDE ALUMINIUM 105 DEG	-	-	-	-	-	-	-	1
9	0011035A-00	BOUCHON POUR CADRE RIGIDE	1	1	1	1	1	1	1	1
10	0031249A-00	CALE DE SERRAGE APPUI PIED DEVANT RIGIDE	1	1	1	1	1	1	1	1

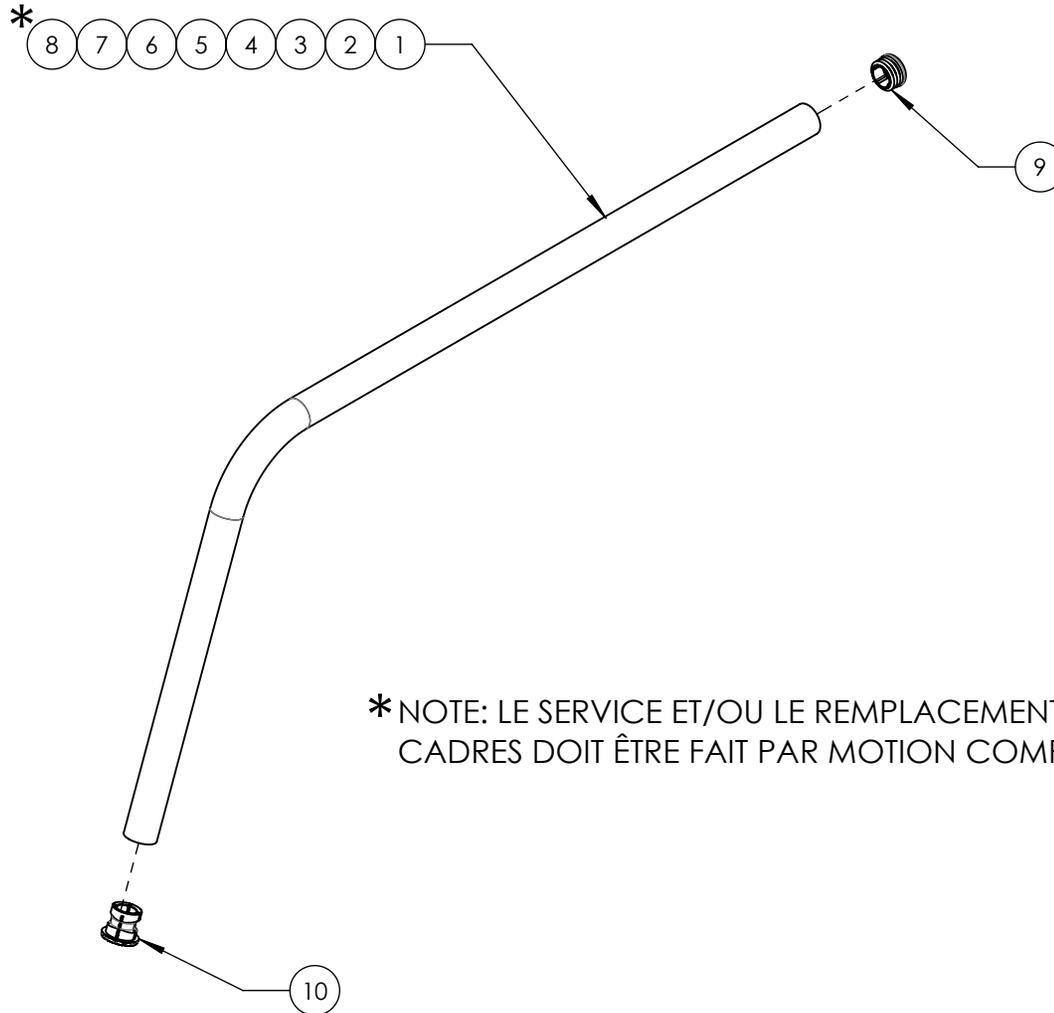


* NOTE: LE SERVICE ET/OU LE REMPLACEMENT DES CADRES DOIT ÊTRE FAIT PAR MOTION COMPOSITES

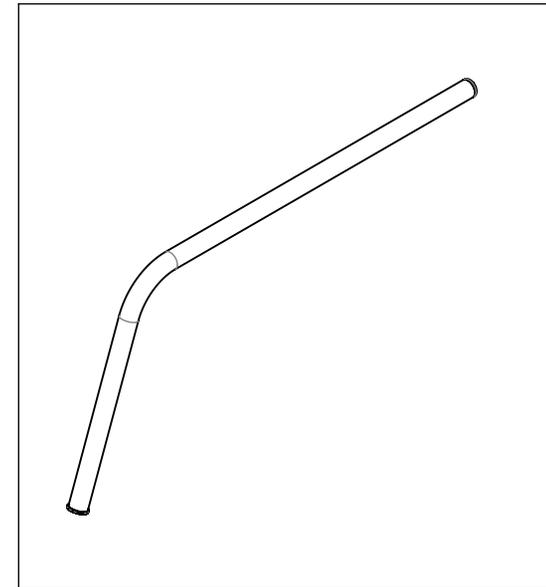

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

Catalogue cadre
Assemblage cadre aluminium Apex

NOTE: LA SERVICE ET/OU LE REMPLACEMENT
 DOIT ÊTRE FAIT PAR MOTION COMPOSITES

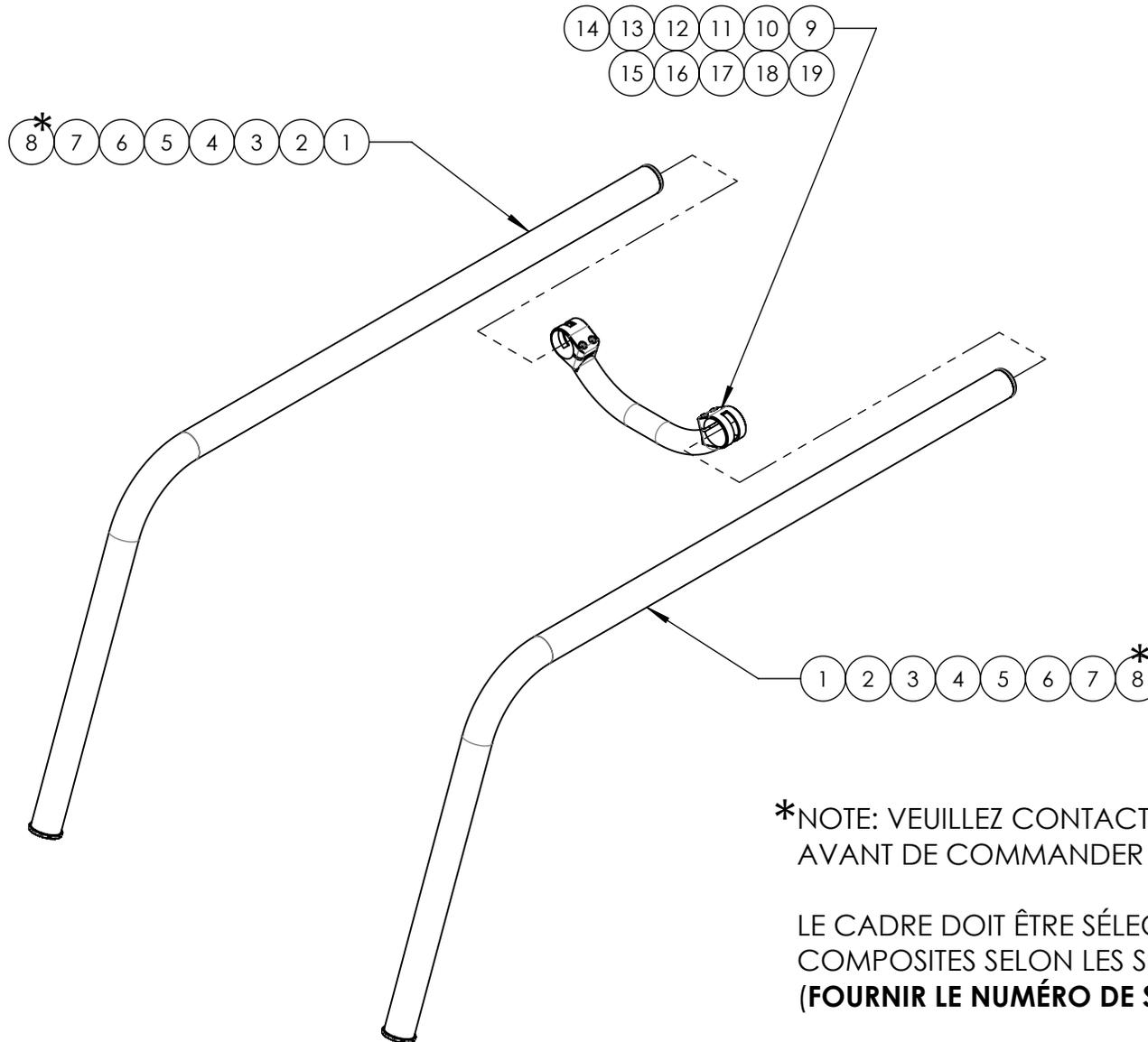

*NOTE: VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE
 AVANT DE COMMANDER LE CADRE.


LE CADRE DOIT ÊTRE SÉLECTIONNÉ ET USINÉ PAR MOTION
 COMPOSITES SELON LES SPÉCIFICATIONS DU FAUTEUIL
(FOURNIR LE NUMÉRO DE SÉRIE DU FAUTEUIL SVP)

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	9003232B-0	CADRE - ALU, RF, 70 DEG (NOIR)	2
2	9003233B-00	CADRE - ALU, RF, 75 DEG (NOIR)	2
3	9003234B-00	CADRE - ALU, RF, 80 DEG (NOIR)	2
4	9003235B-00	CADRE - ALU, RF, 85 DEG (NOIR)	2
5	9003236B-00	CADRE - ALU, RF, 90 DEG (NOIR)	2
6	9003237B-00	CADRE - ALU, RF, 95 DEG (NOIR)	2
7	9003238B-00	CADRE - ALU, RF, 100 DEG (NOIR)	2
8	9003239B-00	CADRE - ALU, RF, 105 DEG (NOIR)	2
9	9003332B-00	RAIDISSEUR ASSISE - ALU, 10po LARGEUR	1
10	9003333B-00	RAIDISSEUR ASSISE - ALU, 11po LARGEUR	1
11	9003334B-00	RAIDISSEUR ASSISE - ALU, 12po LARGEUR	1
12	9003335B-00	RAIDISSEUR ASSISE - ALU, 13po LARGEUR	1
13	9003336B-00	RAIDISSEUR ASSISE - ALU, 14po LARGEUR	1
14	9003337B-00	RAIDISSEUR ASSISE - ALU, 15po LARGEUR	1
15	9003338B-00	RAIDISSEUR ASSISE - ALU, 16po LARGEUR	1
16	9003339B-00	RAIDISSEUR ASSISE - ALU, 17po LARGEUR	1
17	9003340B-00	RAIDISSEUR ASSISE - ALU, 18po LARGEUR	1
18	9003341B-00	RAIDISSEUR ASSISE - ALU, 19po LARGEUR	1
19	9003342B-00	RAIDISSEUR ASSISE - ALU, 20po LARGEUR	1

**9003223A 9003225A
POTENCE - DROITE**


* NOTE: L'INSTALLATION ET/OU LE REMPLACEMENT DE LA POTENCE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR MOTION COMPOSITES .

VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE AVANT DE COMMANDER LA POTENCE (#0022142A-00) (FOURNIR LE NUMÉRO DE SÉRIE DU FAUTEUIL SVP)

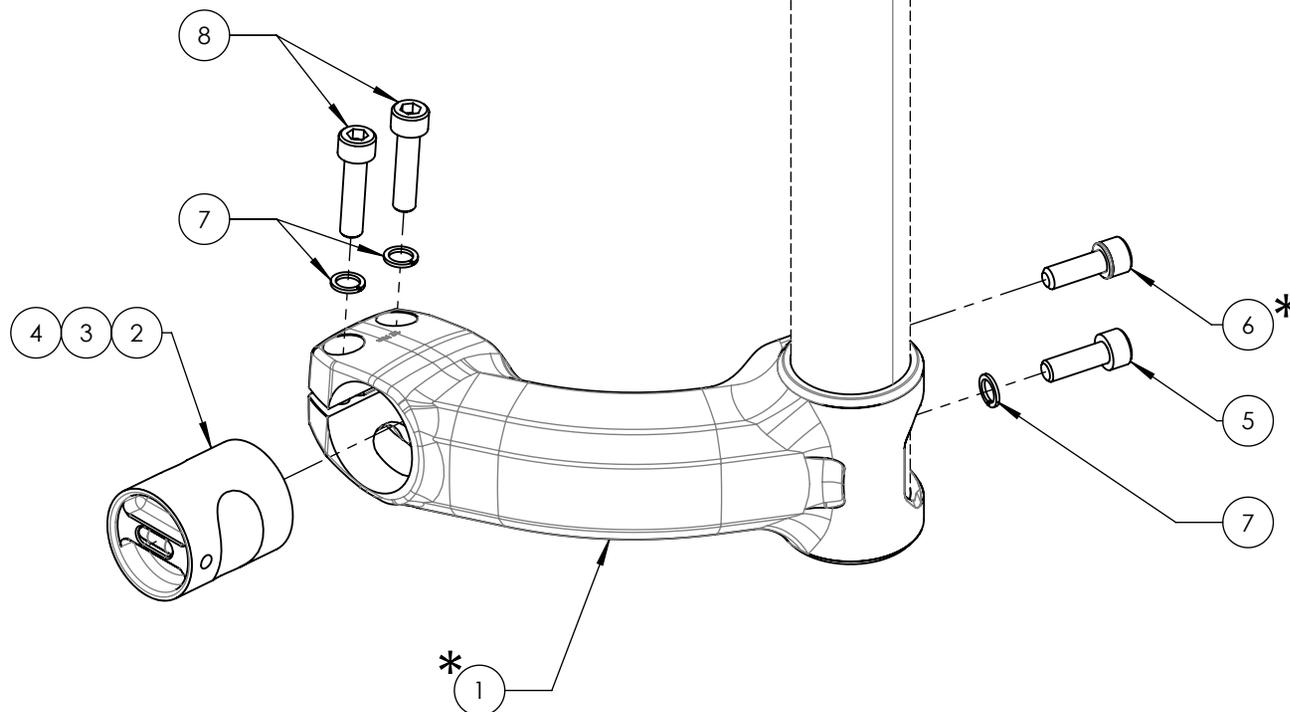


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9003223	9003224	9003225
1*	0022142A-00	POTENCE DE ROUE AVANT DROITE	1	1	1
2	0022507A-00	BÂTI EN ANGLE 0 DEG - ASSEMBLAGE	1	-	-
3	0022508A-00	BÂTI EN ANGLE 4,5 DEG - ASSEMBLAGE	-	1	-
4	0022509A-00	BÂTI EN ANGLE 9 DEG - ASSEMBLAGE	-	-	1
5	0090770A-00	VIS TÊTE CYLIND M6x1x18mm L	1	1	1
6*	0091044A-00	VIS SÉCURITÉ TÊTE CYLIND M6x1x18mm L	1	1	1
7	0099559A-00	RONDELLE DE BLOCAGE 1/4	3	3	3
8	0090773A-00	VIS TÊTE CYLIND M6x1x25mm L	2	2	2


9003223A-00
POTENCE - STD, DROITE, 0 DEG

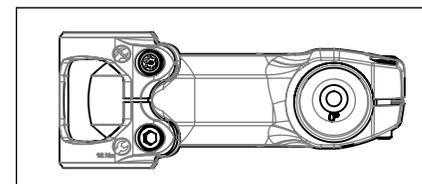

9003224A-00
POTENCE - STD, DROITE, 4.5 DEG

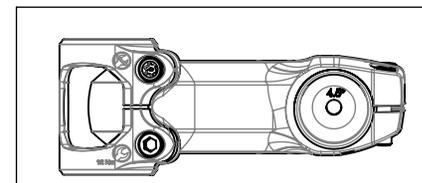


9003225A-00
POTENCE - STD, DROITE, 9 DEG

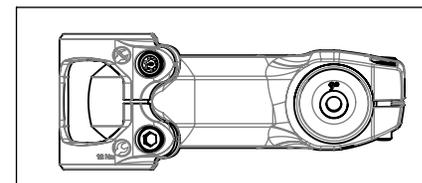

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


9003226A_9003228A
POTENCE - GAUCHE

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9003226	9003227	9003228
1*	0022141A-00	POTENCE DE ROUE AVANT GAUCHE	1	1	1
2	0022507A-00	BÂTI EN ANGLE 0 DEG - ASSEMBLAGE	1	-	-
3	0022508A-00	BÂTI EN ANGLE 4.5 DEG - ASSEMBLAGE	-	1	-
4	0022509A-00	BÂTI EN ANGLE 9 DEG - ASSEMBLAGE	-	-	1
5	0090770A-00	VIS TÊTE CYLIND M6x1x18mm L	1	1	1
6*	0091044A-00	VIS SÉCURITÉ TÊTE CYLIND M6x1x18mm L	1	1	1
7	0090773A-00	VIS TÊTE CYLIND M6x1x25mm L	2	2	2
8	0099559A-00	RONDELLE DE BLOCAGE 1/4	3	3	3

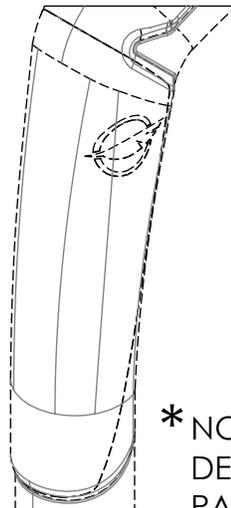


* NOTE: L'INSTALLATION ET/OU LE REMPLACEMENT DE LA POTENCE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR MOTION COMPOSITES .


VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE AVANT DE COMMANDER LA POTENCE (#0022141A-00) (FOURNIR LE NUMÉRO DE SÉRIE DU FAUTEUIL SVP)

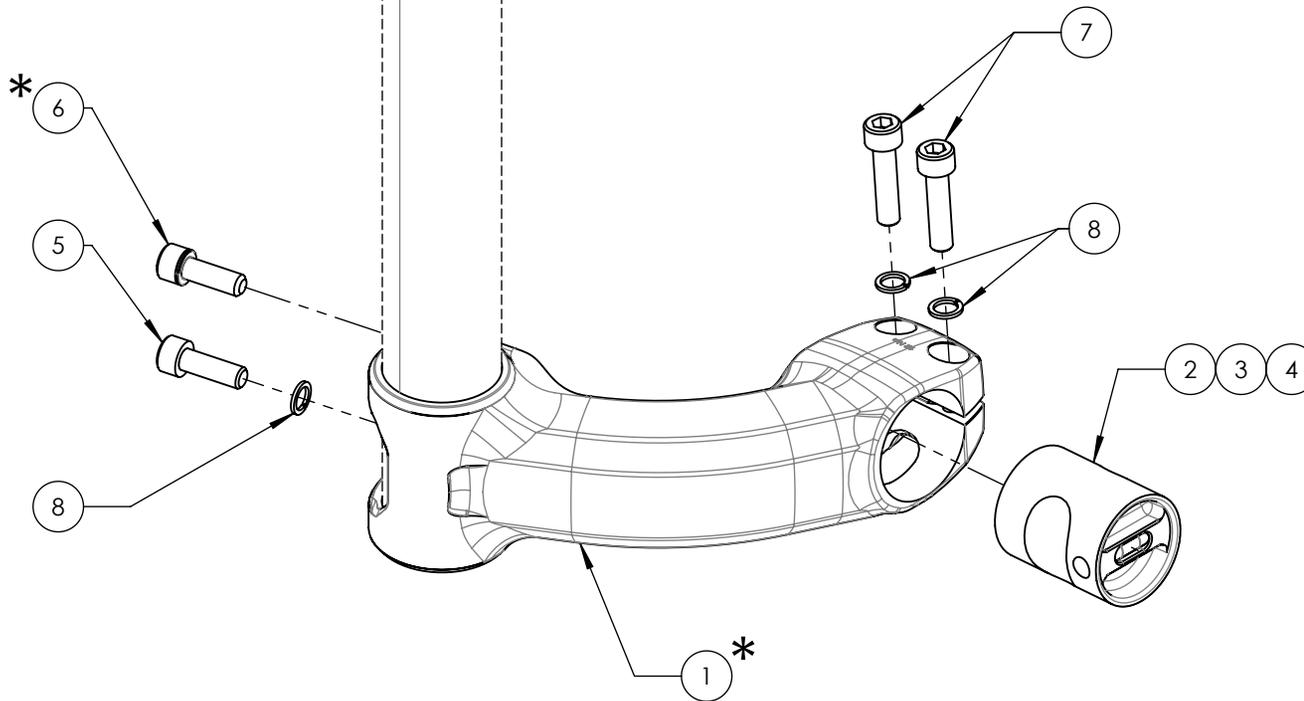


9003226A-00
 POTENCE - STD, GAUCHE, 0 DEG

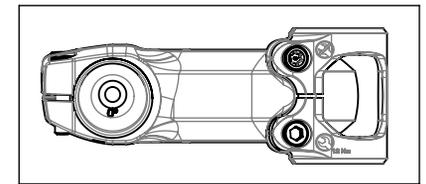

9003227A-00
 POTENCE - STD, GAUCHE, 4.5 DEG

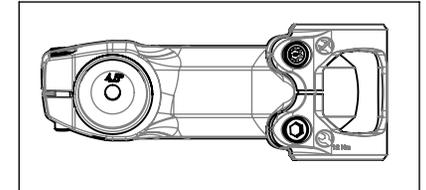


9003228A-00
 POTENCE - STD, GAUCHE, 9 DEG

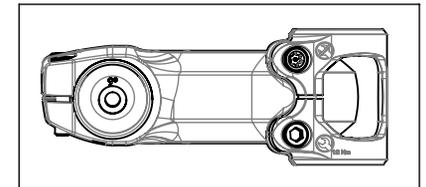


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9003229A_9003231A
FOURCHE - ASSEMBLAGE AVEC TIGE DE FOURCHE


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9003229	9003230	9003231
1	0022151A-00	TIGE DE FOURCHE STANDARD À CONTRAINTES RÉDUITES	1	-	-
2	0022143A-00	TIGE DE FOURCHE +0.5 À CONTRAINTES RÉDUITES	-	1	-
3	0022144A-00	TIGE DE FOURCHE +1 À CONTRAINTES RÉDUITES	-	-	1
4	0022520A-00	FOURCHE ROULEMENT À BILLE INTÉGRÉ - ASSEMBLAGE	1	1	1
5	0022152A-00	COUVERCLE DE FOURCHE A ROULEMENT À BILLE INTÉGRÉ	1	1	1
6	0090767A-00	VIS TÊTE CYLIND M6x1x14mm L	1	1	1
7	0090991A-00	ÉCROU AUTOBLOQUANT MINCE M10x1.5	1	1	1

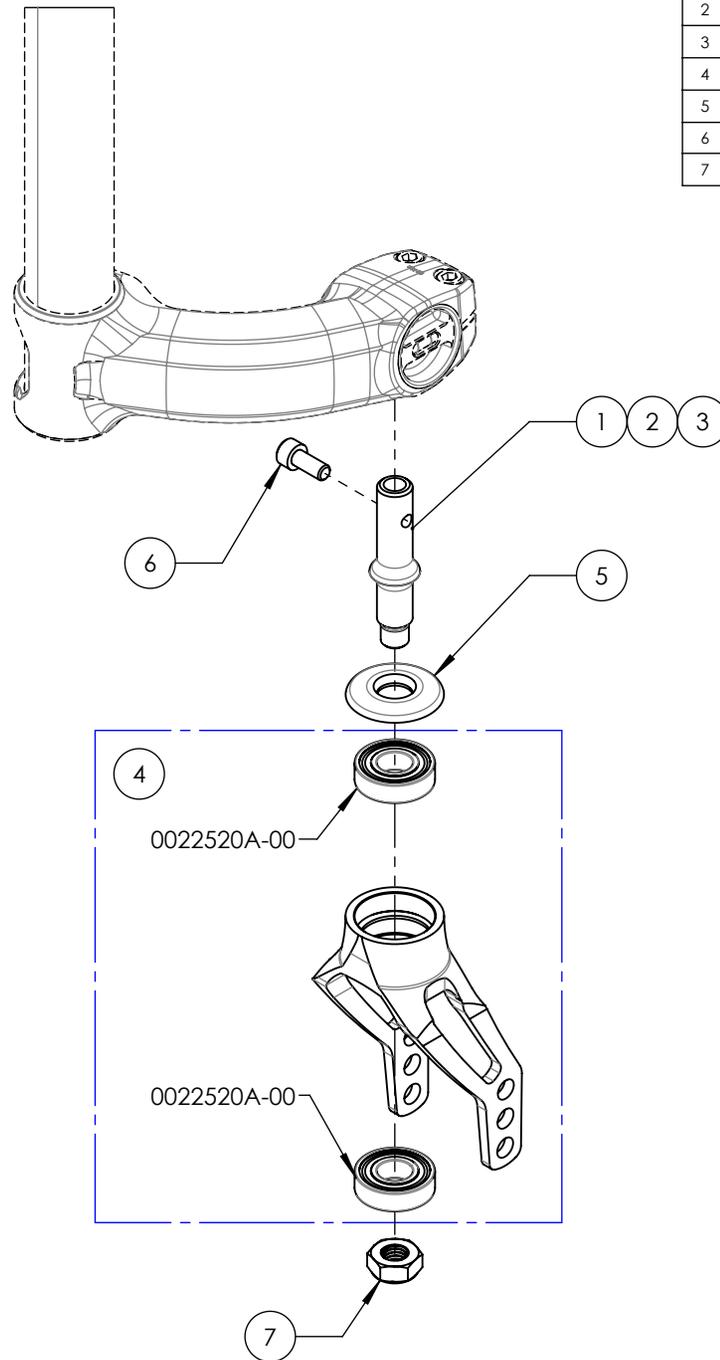


9003229A-00
 FOURCHE - ASSY & TIGE DE FOURCHE STD

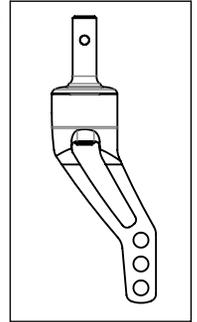

9003230A-00
 FOURCHE - ASSY & TIGE DE FOURCHE +0.5po

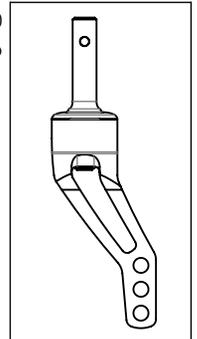

9003231A-00
 FOURCHE - ASSY & TIGE DE FOURCHE +1po

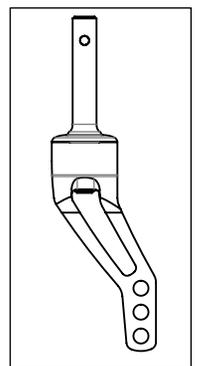


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9003268B 9003270B
POTENCE - COURTE, DROITE


*NOTE: L'INSTALLATION ET/OU LE REMPLACEMENT DE LA POTENCE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR MOTION COMPOSITES .

VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE AVANT DE COMMANDER LA POTENCE (#0022163A-00) (FOURNIR LE NUMÉRO DE SÉRIE DU FAUTEUIL SVP)

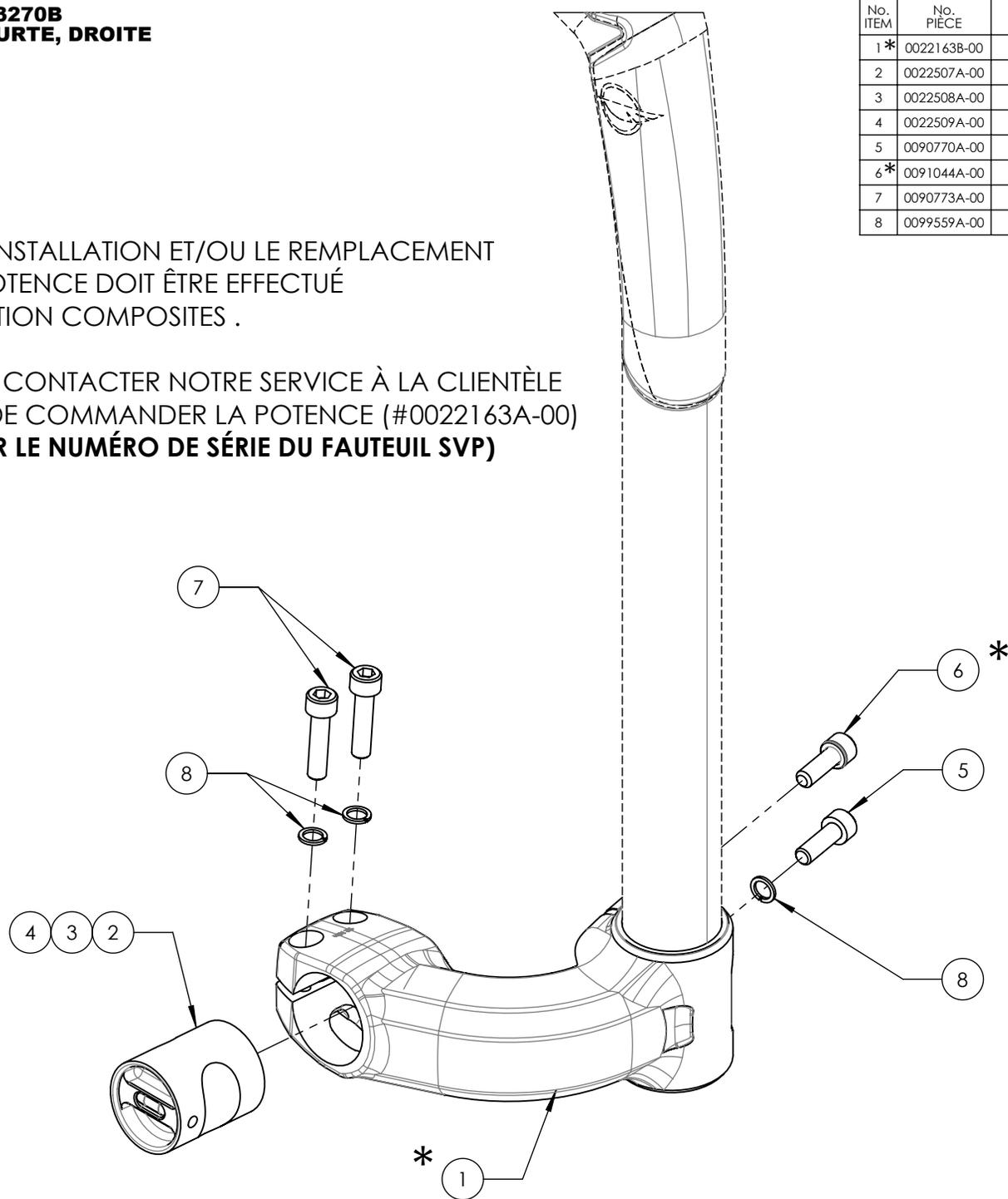


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9003268	9003269	9003270
1*	0022163B-00	POTENCE DE ROUE AVANT 65mm, DROITE	1	1	1
2	0022507A-00	BÂTI EN ANGLE 0 DEG - ASSEMBLAGE	1	-	-
3	0022508A-00	BÂTI EN ANGLE 4.5 DEG - ASSEMBLAGE	-	1	-
4	0022509A-00	BÂTI EN ANGLE 9 DEG - ASSEMBLAGE	-	-	1
5	0090770A-00	VIS TÊTE CYLIND M6x1x18mm L	1	1	1
6*	0091044A-00	VIS SÉCURITÉ TÊTE CYLIND M6x1x18mm L	1	1	1
7	0090773A-00	VIS TÊTE CYLIND M6x1x25mm L	2	2	2
8	0099559A-00	RONDELLE DE BLOCAGE 1/4	3	3	3


9003268A-00
 POTENCE - COURTE, DROITE, 0 DEG

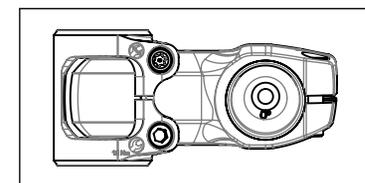

9003269A-00
 POTENCE - COURTE, DROITE, 4.5 DEG

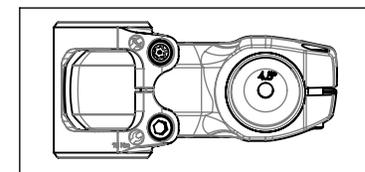


9003270A-00
 POTENCE - COURTE, DROITE, 9 DEG

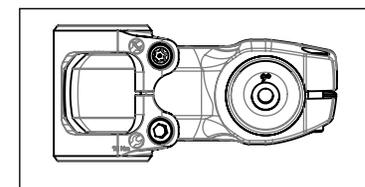


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9003271B_9003273B
POTENCE - COURTE, GAUCHE

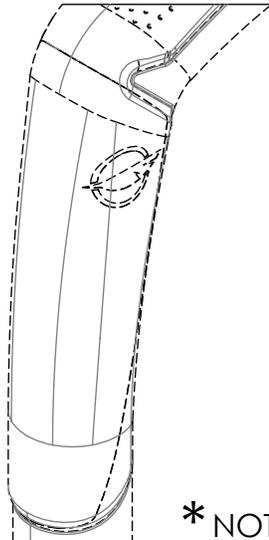


*** NOTE: L'INSTALLATION ET/OU LE REMPLACEMENT DE LA POTENCE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR MOTION COMPOSITES .**

VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE AVANT DE COMMANDER LA POTENCE (#0022164A-00) (FOURNIR LE NUMÉRO DE SÉRIE DU FAUTEUIL SVP)

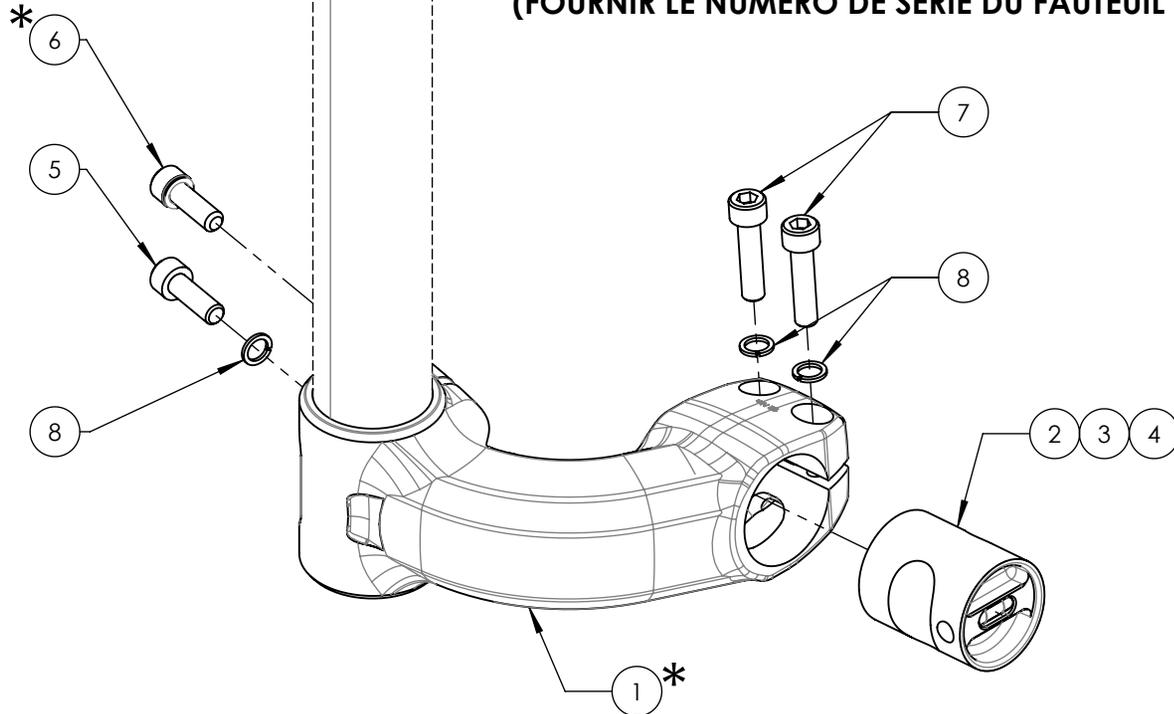


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9003271	9003272	9003273
1 *	0022164B-00	POTENCE DE ROUE AVANT 65mm, GAUCHE	1	1	1
2	0022507A-00	BÂTI EN ANGLE 0 DEG - ASSEMBLAGE	1	-	-
3	0022508A-00	BÂTI EN ANGLE 4.5 DEG - ASSEMBLAGE	-	1	-
4	0022509A-00	BÂTI EN ANGLE 9 DEG - ASSEMBLAGE	-	-	1
5	0090770A-00	VIS TÊTE CYLIND M6x1x18mm L	1	1	1
6 *	0091044A-00	VIS SÉCURITÉ TÊTE CYLIND M6x1x18mm L	1	1	1
7	0090773A-00	VIS TÊTE CYLIND M6x1x25mm L	2	2	2
8	0099559A-00	RONDELLE DE BLOCAGE 1/4	3	3	3


9003271A-00
 POTENCE - COURTE, GAUCHE, 0 DEG

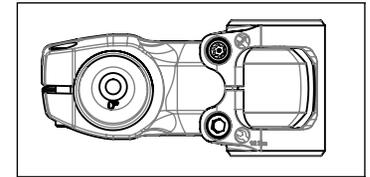

9003272A-00
 POTENCE - COURTE, GAUCHE, 4.5 DEG

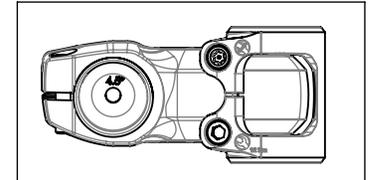


9003273A-00
 POTENCE - COURTE, GAUCHE, 9 DEG

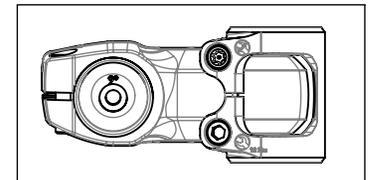


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9010365A_9010367A
FOURCHE - FROG LEGS, PHASE-TWO, SRS (PAIRE)

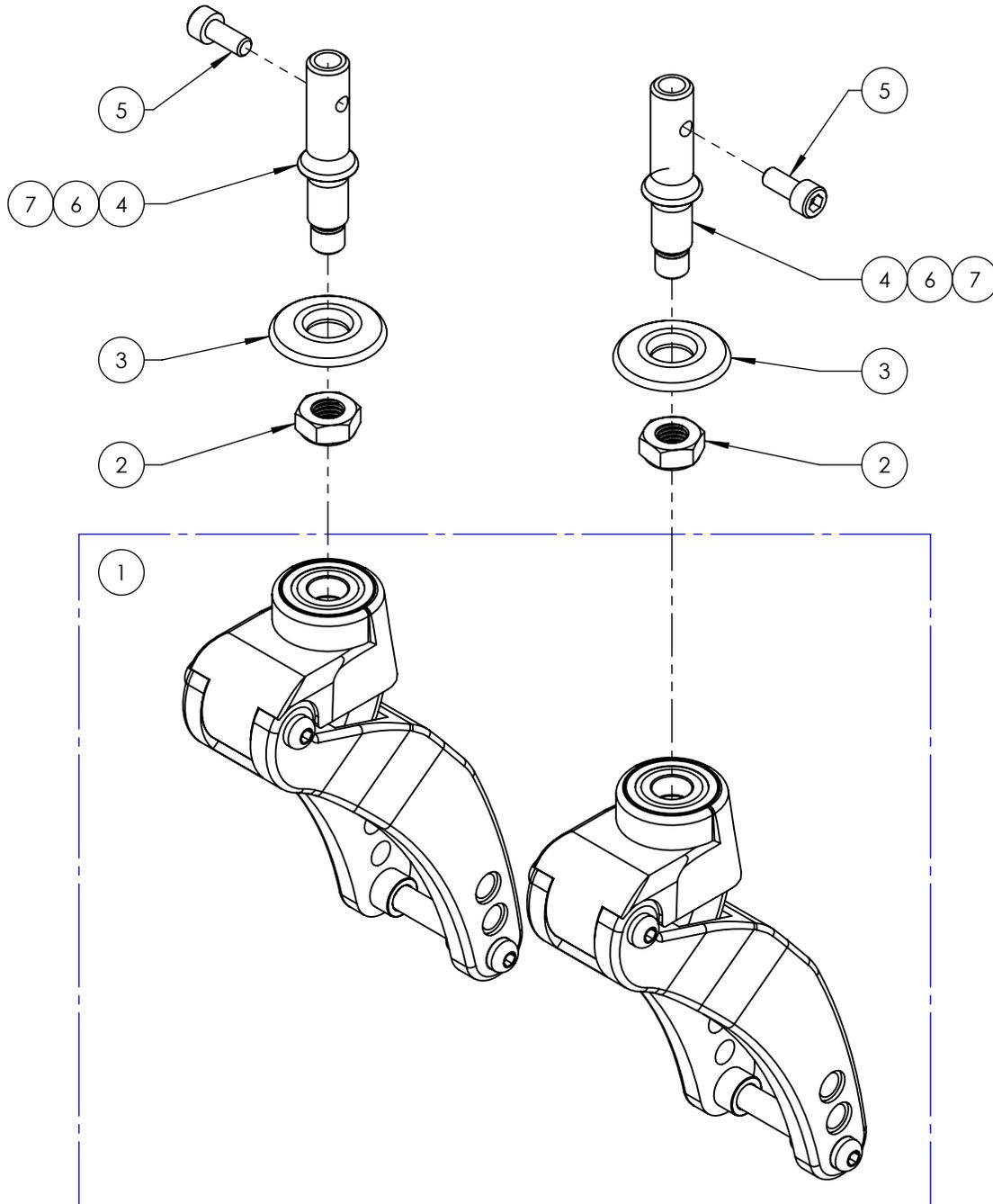


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9010365	9010366	9010367
1	0022173A-00	FOURCHE FROG LEGS PHASE-TWO ROUL. INTÉGRÉ (PAIRE)	1	1	1
2	0090991A-00	ÉCROU AUTOBLOQUANT MINCE M10x1.5	2	2	2
3	0022152A-00	COUVERCLE DE FOURCHE A ROULEMENT À BILLE INTÉGRÉ	2	2	2
4	0022165A-00	TIGE DE FOURCHE SRS STANDARD	2	-	-
5	0090767A-00	VIS TÊTE CYLIND M6x1x14mm L	2	2	2
6	0022166A-00	TIGE DE FOURCHE SRS +0.5	-	2	-
7	0022167A-00	TIGE DE FOURCHE SRS +1	-	-	2


9010365A-00
 FOURCHE - FROG LEGS, PHASE-TWO, SRS STD (PAIRE)

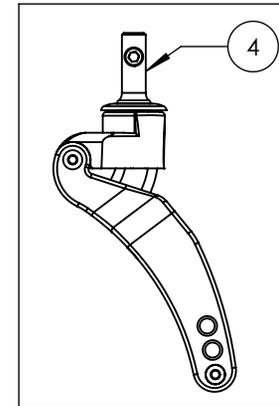

9010366A-00
 FOURCHE - FROG LEGS, PHASE-TWO, SRS +0.5po (PAIRE)



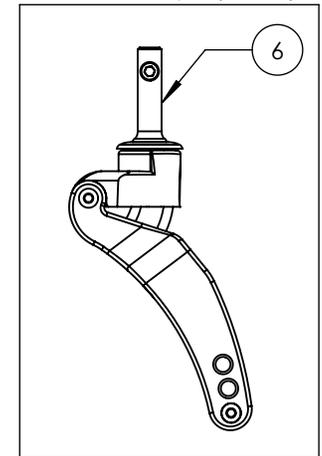


9010367A-00
 FOURCHE - FROG LEGS, PHASE-TWO, SRS +1po (PAIRE)

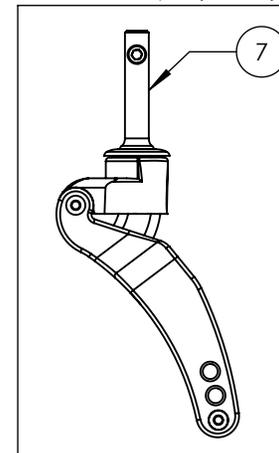

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

Catalogue de roues avant
Roues avant

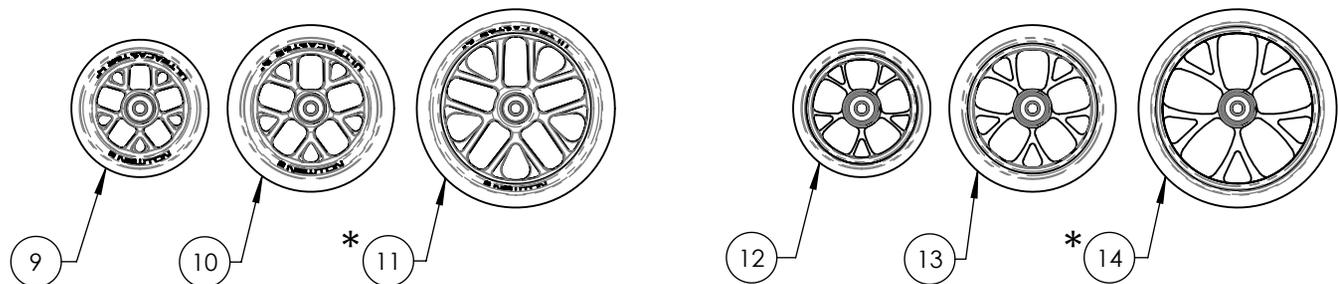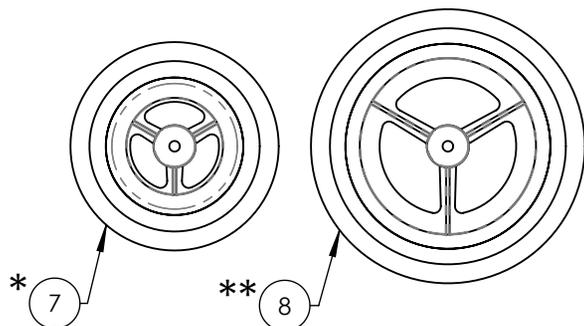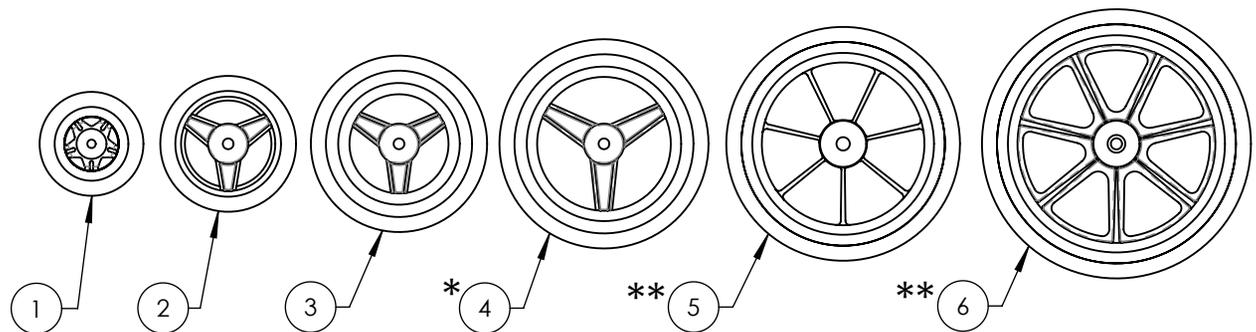

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0022016A-00	ROUE AVANT STANDARD 3x1po	1
2	0022017A-00	ROUE AVANT STANDARD 4x1po	1
3	0022018A-00	ROUE AVANT STANDARD 5x1po	1
4 *	0022019A-00	ROUE AVANT STANDARD 6x1po	1
5 **	0022020A-00	ROUE AVANT STANDARD 7x1po	1
6 **	0022021A-00	ROUE AVANT STANDARD 8x1po	1
7 *	0022025A-00	ROUE AVANT PNEUMATIC 6x1¼po	1
8 **	0022027A-00	ROUE AVANT PNEUMATIC 8x1¼po	1
9	0022514A-00	ROUE NEWTON ULTRACASTER PLASTIQUE 4x1½po	1
10	0022515A-00	ROUE NEWTON ULTRACASTER PLASTIQUE 5x1½po	1
11 *	0022516A-00	ROUE NEWTON ULTRACASTER PLASTIQUE 6x1½po	1
12	0022517A-00	ROUE NEWTON ULTRACASTER ALU 4x1½po	1
13	0022518A-00	ROUE NEWTON ULTRACASTER ALU 5x1½po	1
14 *	0022519A-00	ROUE NEWTON ULTRACASTER ALU 6x1½po	1

* :NON DISPONIBLE AVEC FOURCHE MONO VELOCE
** :NON DISPONIBLE AVEC FOURCHE VELOCE & APEX

REPLACEMENT DE ROULEMENT A BILLES

ROUES ULTRACASTER

0022514A-00 à 0022519A-00

NoPIÈCE: 0022037A-00

ROUES DURES & PNEUMATIQUES


0022016A-00 à 0022021A-00

0022025A-00 & 0022027A-00

NoPIÈCE: 0022038A-00

Catalogue de roues avant
Fourches à suspension Frog Legs

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	9010365A-00	FOURCHE - FROG LEGS, PHASE-TWO, SRS STD (PAIRE)	1
2	9010366A-00	FOURCHE - FROG LEGS, PHASE-TWO, SRS +0.5po (PAIRE)	1
3	9010367A-00	FOURCHE - FROG LEGS, PHASE-TWO, SRS +1po (PAIRE)	1

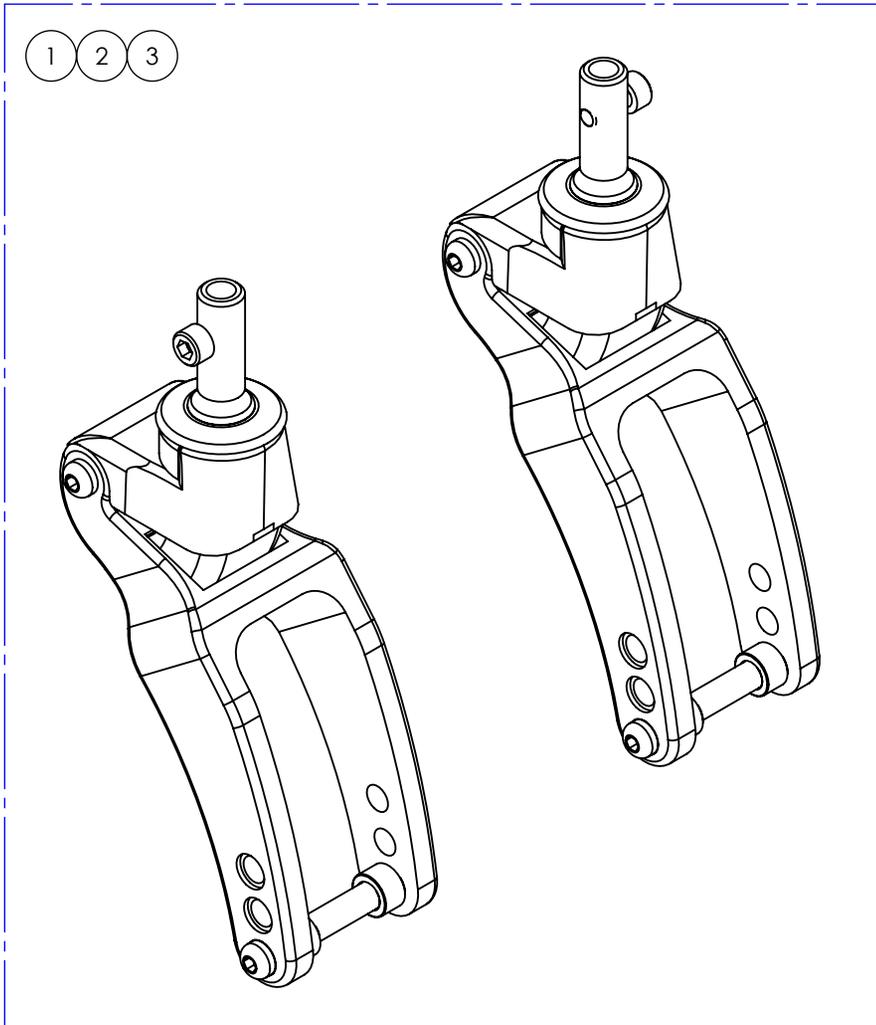

NOTE: VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE
À LA CLIENTÈLE AVANT DE COMMANDER LES
FOURCHES À SUSPENSION FROG LEGS






VEUILLEZ SPÉCIFIER

- POIDS DE L'UTILISATEUR
- HAUTEUR SOL-SIÈGE AVANT
- DIMENSION DES ROUES AVANT

**Catalogue de roues avant
Assemblage de potence**

***NOTE: L'INSTALLATION ET/OU LE REMPLACEMENT
DE LA POTENCE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR
MOTION COMPOSITES**




**VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE
AVANT DE COMMANDER LA POTENCE
(FOURNIR LE NUMÉRO DE SÉRIE DU FAUTEUIL SVP)**

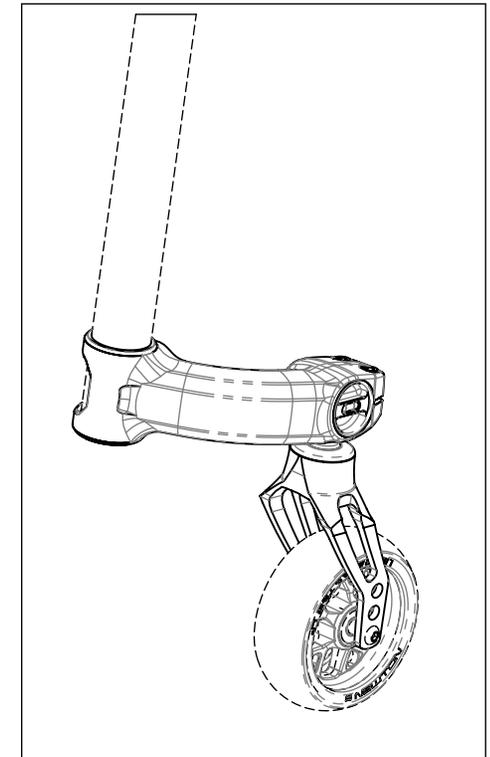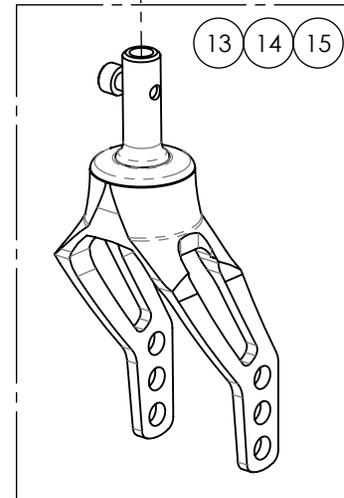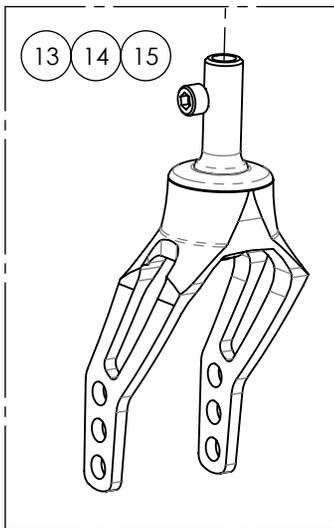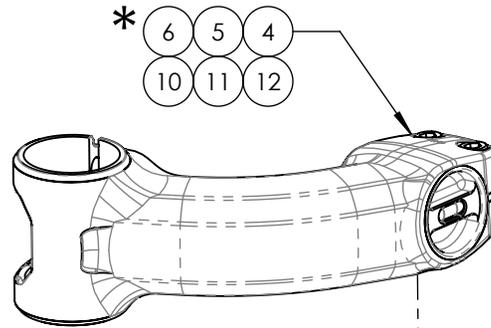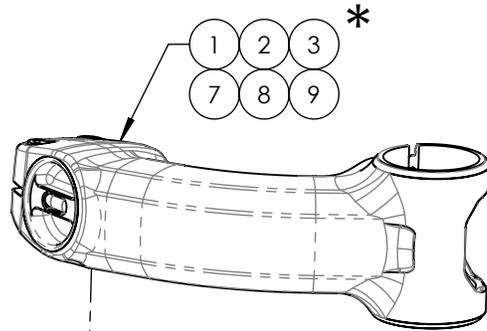

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	*9003223A-00	POTENCE - STD, DROITE, 0 DEG	1
2	*9003224A-00	POTENCE - STD, DROITE, 4,5 DEG	1
3	*9003225A-00	POTENCE - STD, DROITE, 9 DEG	1
4	*9003226A-00	POTENCE - STD, GAUCHE, 0 DEG	1
5	*9003227A-00	POTENCE - STD, GAUCHE, 4,5 DEG	1
6	*9003228A-00	POTENCE - STD, GAUCHE, 9 DEG	1
7	*9003268B-00	POTENCE - COURTE, DROITE, 0 DEG	1
8	*9003269B-00	POTENCE - COURTE, DROITE, 4,5 DEG	1
9	*9003270B-00	POTENCE - COURTE, DROITE, 9 DEG	1
10	*9003271B-00	POTENCE - COURTE, GAUCHE, 0 DEG	1
11	*9003272B-00	POTENCE - COURTE, GAUCHE, 4,5 DEG	1
12	*9003273B-00	POTENCE - COURTE, GAUCHE, 9 DEG	1
13	9003229A-00	FOURCHE - ASSY & TIGE DE FOURCHE STD	2
14	9003230A-00	FOURCHE - ASSY & TIGE DE FOURCHE +0.5po	2
15	9003231A-00	FOURCHE - ASSY & TIGE DE FOURCHE +1po	2

**ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES**


Catalogue de roues avant
Quincaillerie pour fourche à roulement intégré

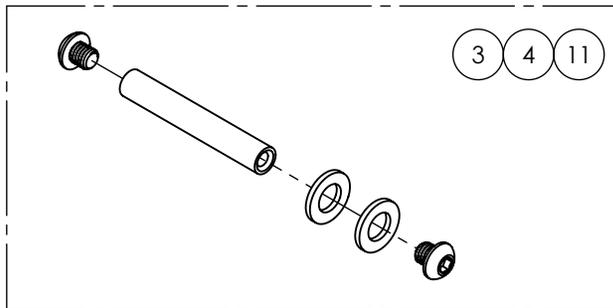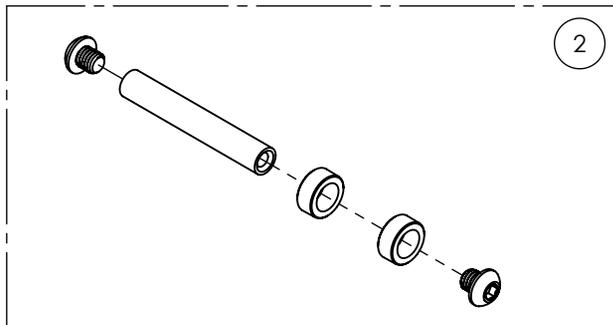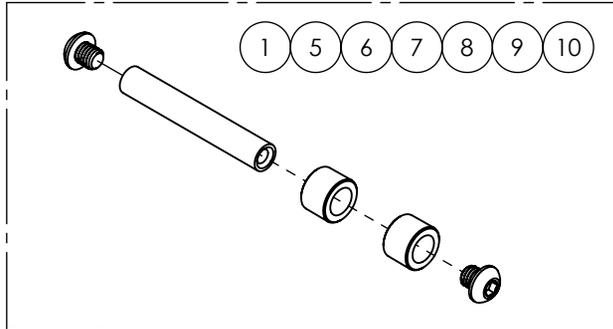


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	9003240A-00	QUINCAIL - IBF, POUR ROUE AVANT DURE 3x1po	1
2	9003241A-00	QUINCAIL - IBF, POUR ROUE AVANT DURE 4x1po	1
3	9003242A-00	QUINCAIL - IBF, POUR ROUE AVANT DURE 5x1po	1
4	9003243A-00	QUINCAIL - IBF, POUR ROUE AVANT DURE 6x1po	1
5	9003246A-00	QUINCAIL - IBF, POUR NEWTON ULTRACASTER 4x1½po	1
6	9003247A-00	QUINCAIL - IBF, POUR NEWTON ULTRACASTER 5x1½po	1
7	9003248A-00	QUINCAIL - IBF, POUR NEWTON ULTRACASTER 6x1½po	1
8	9003249A-00	QUINCAIL - IBF, POUR ROUE AVANT DURE ALU 4x1po	1
9	9003250A-00	QUINCAIL - IBF, POUR ROUE AVANT DURE ALU 5x1po	1
10	9003251A-00	QUINCAIL - IBF, POUR ROUE AVANT DURE ALU 6x1po	1
11	9003252A-00	QUINCAIL - IBF, POUR ROUE AVANT PNEUMATIQUE 6x1¼po	1

0031159A & 0031046A 0031047A
Courroie - Appui-mollet simple


No. ITEM	DESCRIPTION	0031159A-00	0031046A-00	0031047A-00
1	COURROIE APPUI-MOLLETS SIMPLE 12-14 po	1	-	-
2	COURROIE APPUI-MOLLETS SIMPLE 15-17 po	-	1	-
3	COURROIE APPUI-MOLLETS SIMPLE 18-22 po	-	-	1

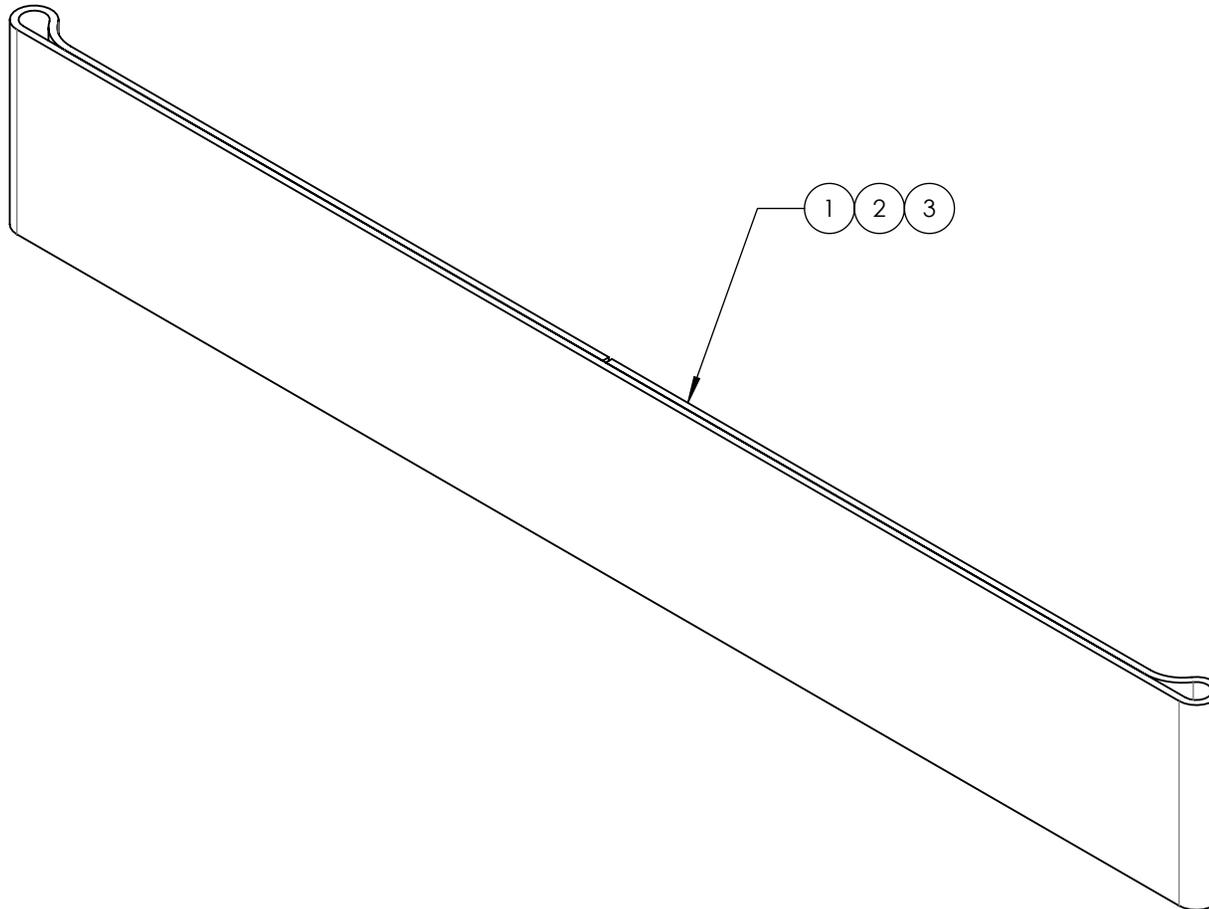


0031159A-00
Courroie - Appui-mollet simple, petit

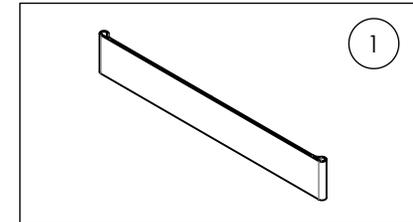

0031046A-00
Courroie - Appui-mollet simple, moyen

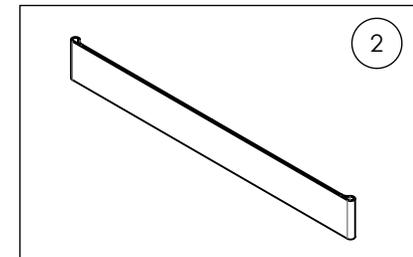


0031047A-00
Courroie - Appui-mollet simple, grand

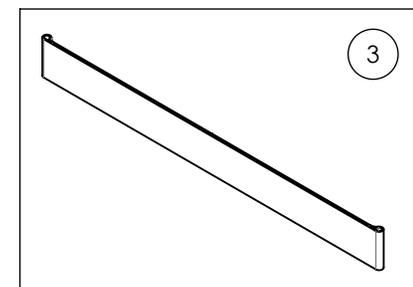


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001414A 9001415A
COURROIES - APPUI-MOLLETS REMBOURRÉES**


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9001414	9001415
1	0031046A-00	COURROIE APPUI-MOLLETS SIMPLE 15-17 po	1	-
2	0031047A-00	COURROIE APPUI-MOLLETS SIMPLE 18-22 po	-	1
3	0031061A-00	COUSSIN APPUI MOLLET	1	1

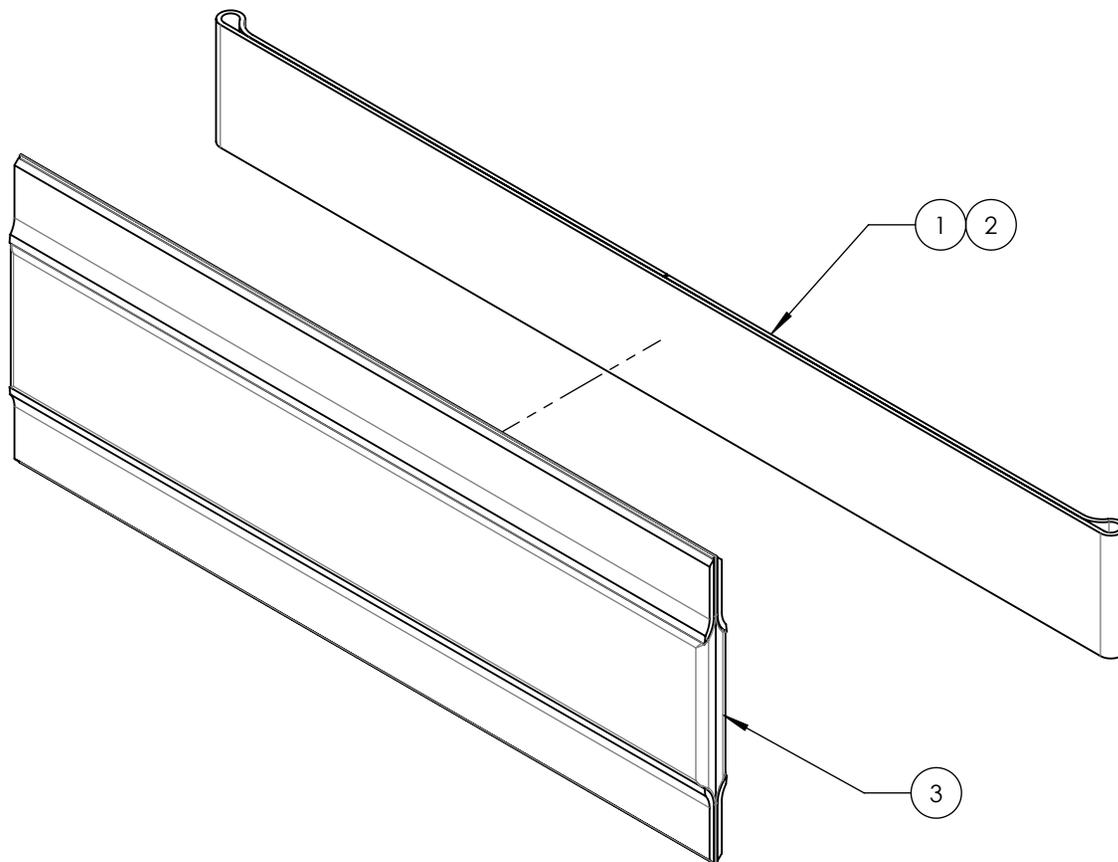

9001414A-00
COURROIE - APPUI-MOLLET
REMBOURRÉE, MOYEN

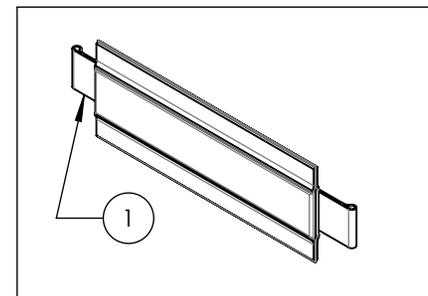


9001415A-00
COURROIE - APPUI-MOLLET
REMBOURRÉE, GRAND

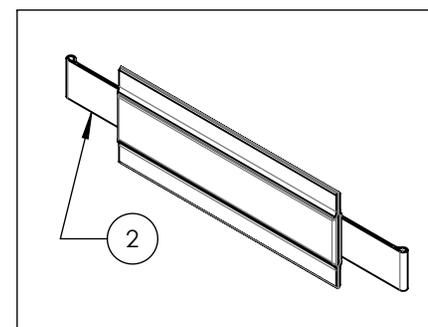


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001580A & 9002140A 9002141A
COURROIE - APPUI-MOLLET DOUBLE**


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9001580 /QTE	9002140 /QTE	9002141 /QTE
1	0031293A-00	COURROIE APPUI-MOLLETS DOUBLE 12-14 po	1	-	-
2	0031281A-00	COURROIE APPUI-MOLLETS DOUBLE 15-17 po	-	1	-
3	0031282A-00	COURROIE APPUI-MOLLETS DOUBLE 18-20 po	-	-	1

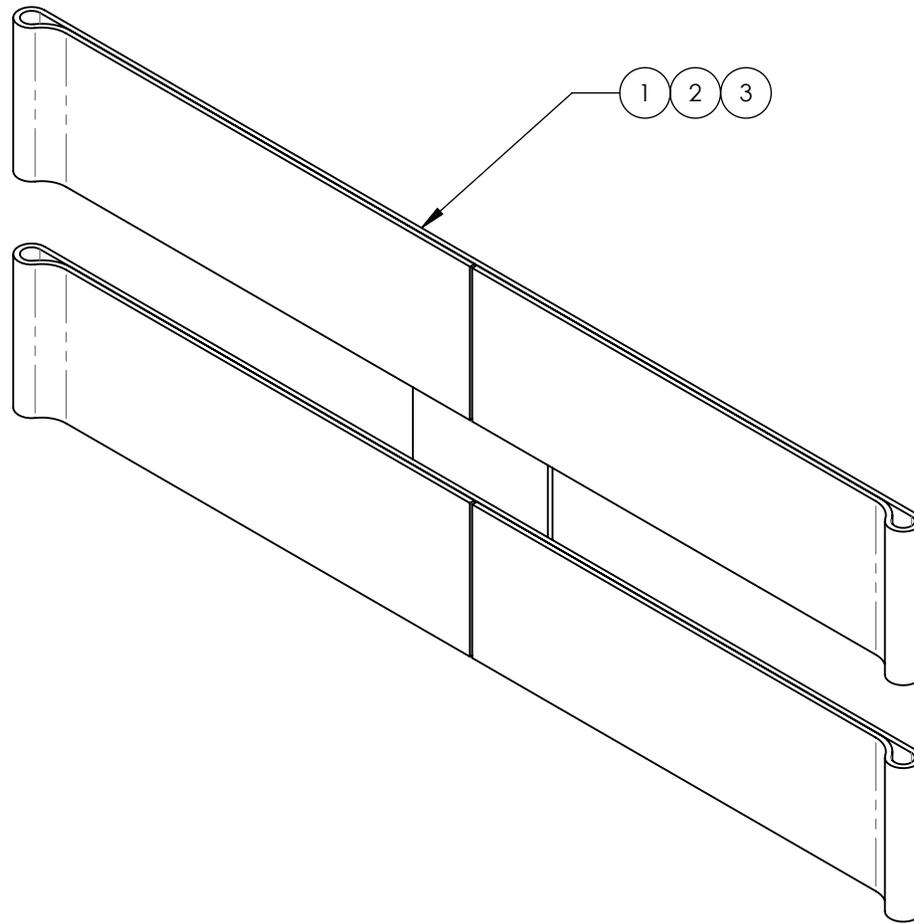


9001580A-00
COURROIE - APPUI-MOLLET
DOUBLE, PETIT

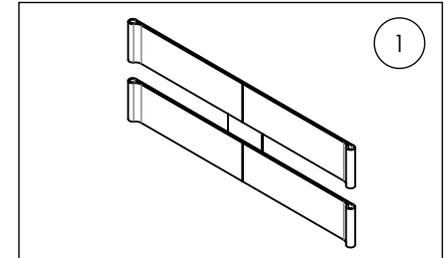

9002140A-00
COURROIE - APPUI-MOLLET
DOUBLE, MOYEN

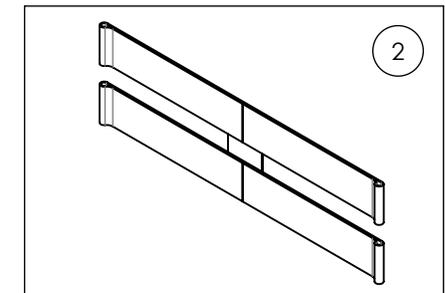

9002141A-00
COURROIE - APPUI-MOLLET
DOUBLE, GRAND

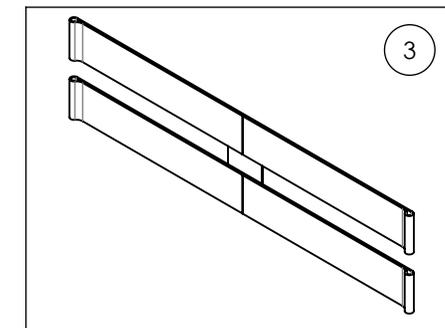


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9003381A 9003385A
PALETTE - ALUMINIUM, STRUCTURE À TUBE OUVERT, AVEC
PLAQUE ABS (INDIQUER LE NUMÉRO DE SÉRIE DU FAUTEUIL)**


***NOTE: CONTACTEZ NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE
AVANT DE COMMANDER UN APPUI PIED TUBULAIRE
OUVERT (#0031255A-00 à #0031259A-00)**

**L'ARTICLE DOIT ÊTRE USINÉ PAR MOTION COMPOSITES
SELON LES SPÉCIFICATIONS DU FAUTEUIL
(FOURNIR LE NUMÉRO DE SÉRIE DU FAUTEUIL SVP)**


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9003381	9003382	9003383	9003384	9003385
1 *	0031255A-00	APPUI PIED TUBULAIRE ALU OUVERT 4po	1	-	-	-	-
2 *	0031256A-00	APPUI PIED TUBULAIRE ALU OUVERT 6po	-	1	-	-	-
3 *	0031257A-00	APPUI PIED TUBULAIRE ALU OUVERT 8po	-	-	1	-	-
4 *	0031258A-00	APPUI PIED TUBULAIRE ALU OUVERT 10po	-	-	-	1	-
5 *	0031259A-00	APPUI PIED TUBULAIRE ALU OUVERT 12po	-	-	-	-	1
6	0031271A-00	PALETTE PLEINE LARGEUR RIVETÉ COMPOSITES 6po	1	1	-	-	-
7	0031272A-00	PALETTE PLEINE LARGEUR RIVETÉ COMPOSITES 8po	-	-	1	-	-
8	0031273A-00	PALETTE PLEINE LARGEUR RIVETÉ COMPOSITES 10po	-	-	-	1	-
9	0031274A-00	PALETTE PLEINE LARGEUR RIVETÉ COMPOSITES 12po	-	-	-	-	1
10	0091051A-00	RIVET ALUMINIUM NOIRE, D 3/16, LG 0.5 po	4	4	4	4	4

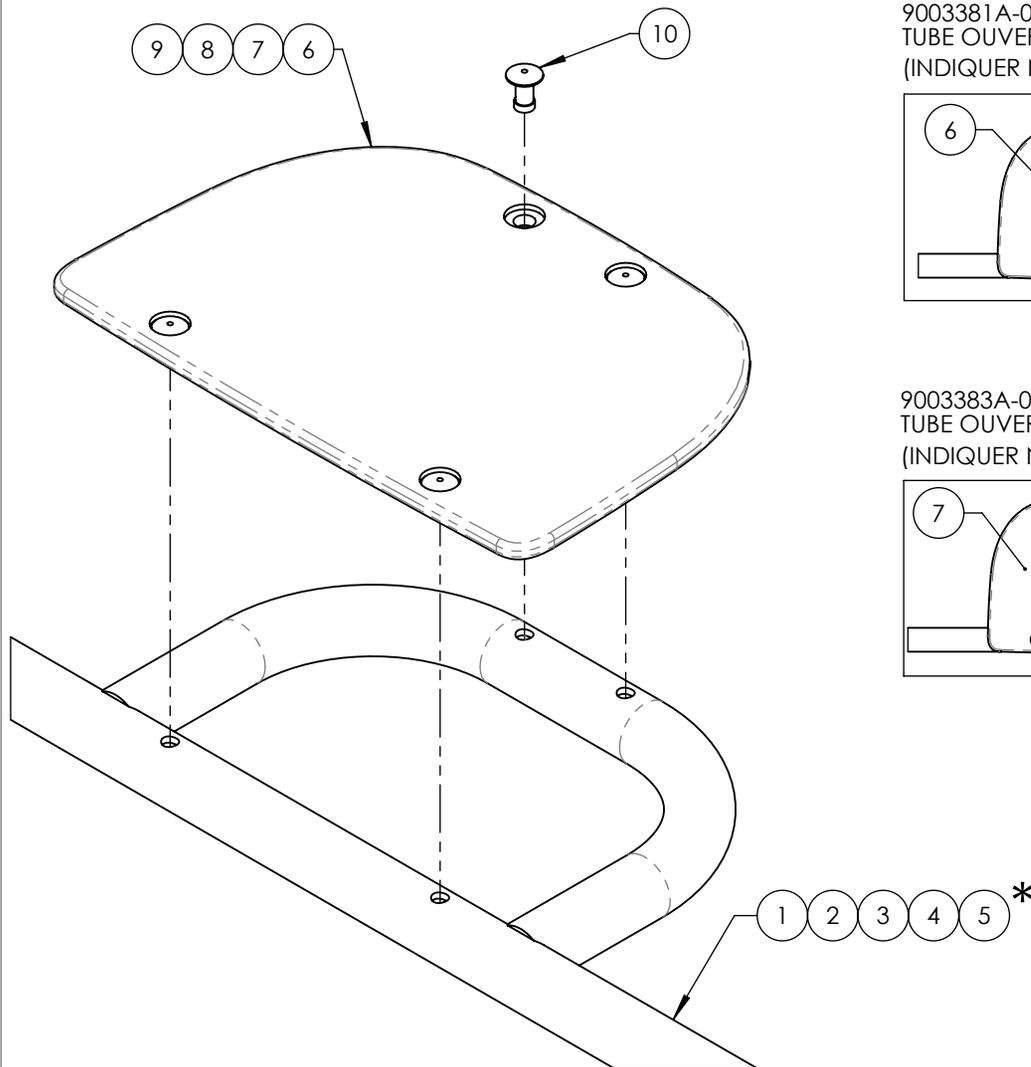


9003381A-00
TUBE OUVERT - PLAQUE ABS, 4x4.75po
(INDIQUER N/S)

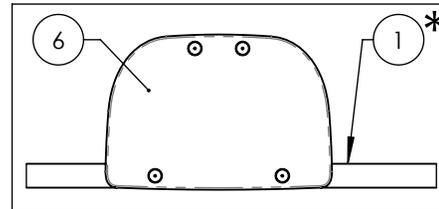


9003382A-00
TUBE OUVERT - PLAQUE ABS, 6x4.75po
(INDIQUER N/S)

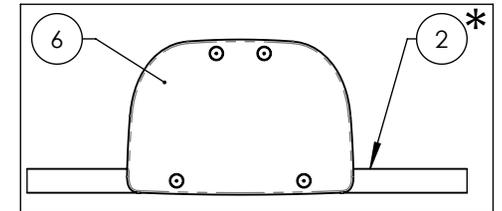


9003383A-00
TUBE OUVERT - PLAQUE ABS, 8x4.75po
(INDIQUER N/S)

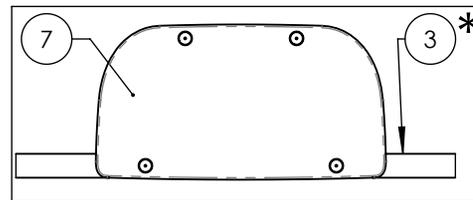

9003384A-00
TUBE OUVERT - PLAQUE ABS, 10x4.75po
(INDIQUER N/S)

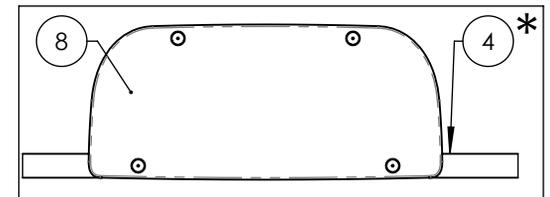


9003385A-00
TUBE OUVERT - PLAQUE ABS, 12x4.75po (INDIQUER N/S)

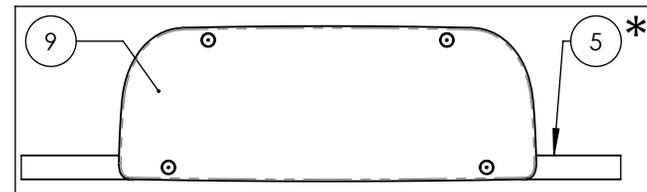


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9003411A-00
ÉLÉVATEUR - POUR PALETTE PLEINE LARGEUR, 2po

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0031010A-00	ÉLÉVATEUR PALETTE 2 po	2
2	0090878A-00	VIS TÊTE FRAISÉE M6x1x70mm L, 18mm FILET	2

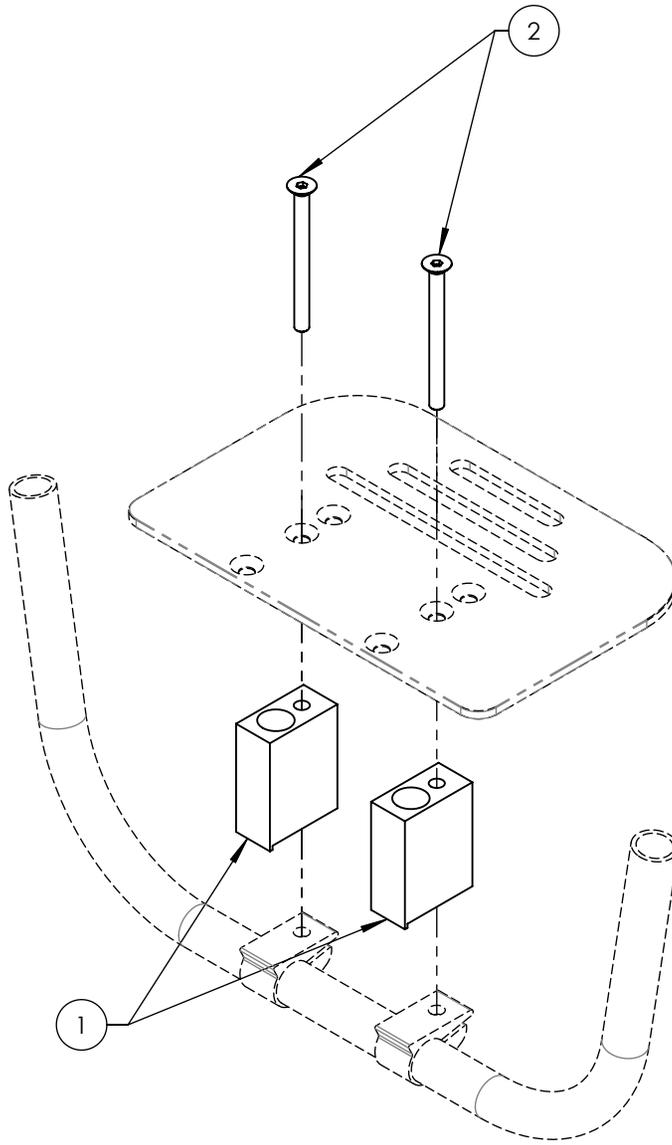


DISPONIBLE SEULEMENT POUR PALETTES
PLEINE LARGEUR ALUMINIUM

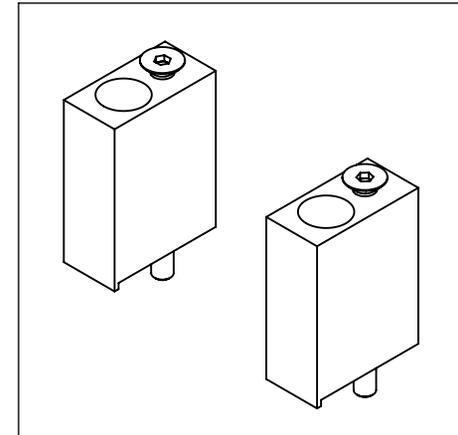


9007801A-00
STRUCTURE - ASSEMBLAGE PALETTE PLEINE LARGEUR

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	9010380A-00	QUINCAILLERIE - POUR PALETTE PLEINE LARGEUR	1
2*	9007807A-00	STRUCTURE - PALETTE PLEINE LARGEUR	1

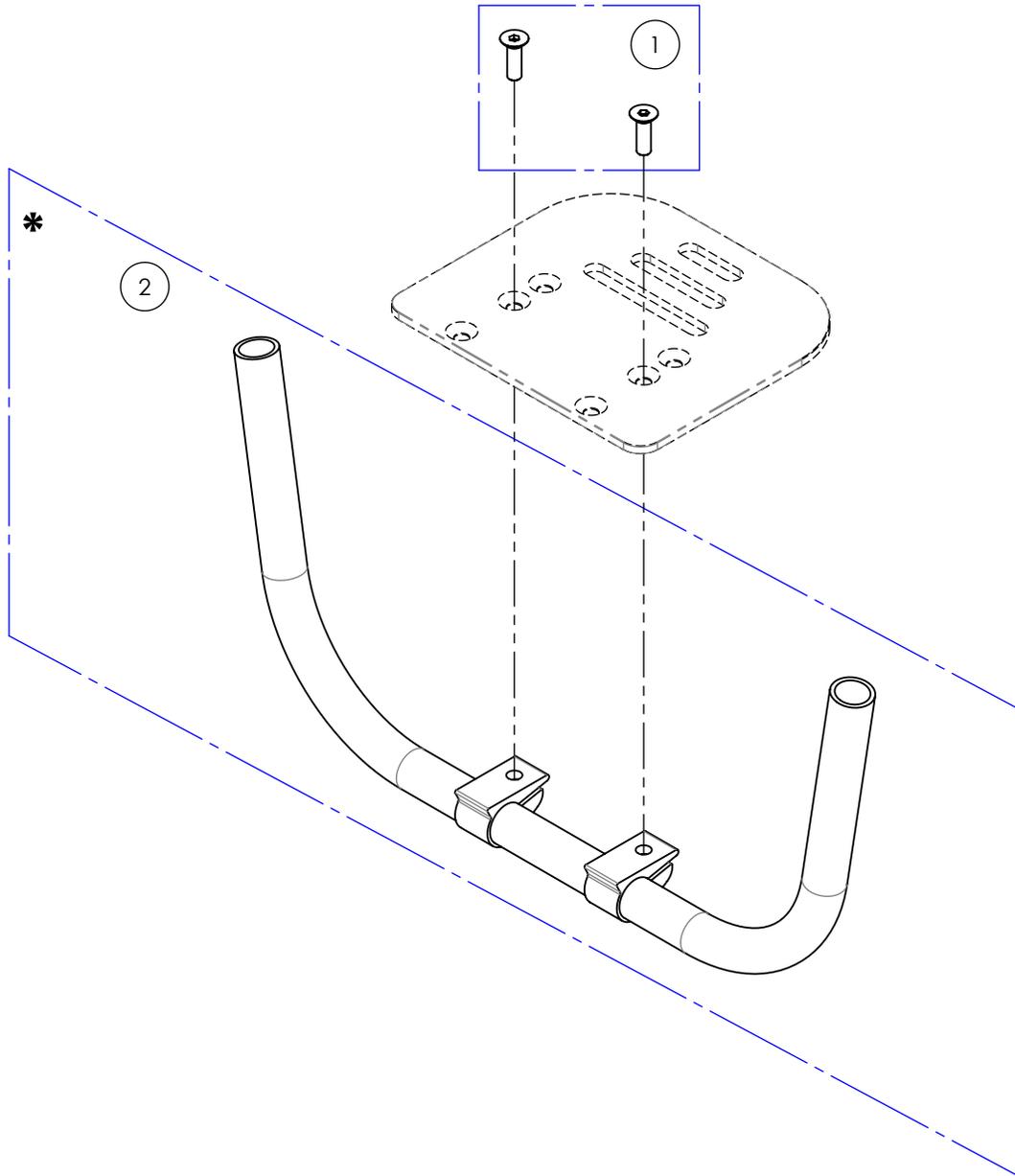

***NOTE: CONTACTEZ NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE AVANT DE COMMANDER LA STRUCTURE DE PALETTE (#9007807A-00)**

L'ARTICLE DOIT ÊTRE USINÉ PAR MOTION COMPOSITES SELON LES SPÉCIFICATIONS DU FAUTEUIL.
(FOURNIR LE NUMÉRO DE SÉRIE DU FAUTEUIL SVP)

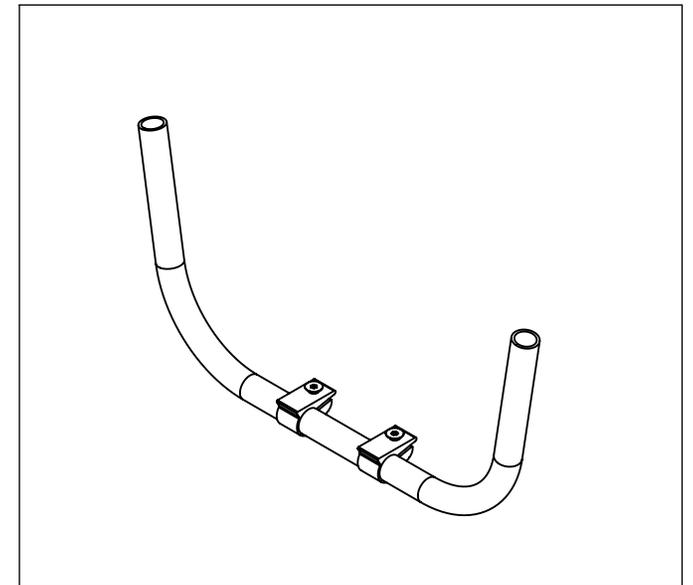



ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9007802A-00
STRUCTURE - RABATTABLE, PALETTE PLEINE LARGEUR

*NOTE: CONTACTEZ NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE
 AVANT DE COMMANDER LA STRUCTURE DE PALETTE (#0070392B-00)

L'ARTICLE DOIT ÊTRE USINÉ PAR MOTION COMPOSITES
 SELON LES SPÉCIFICATIONS DU FAUTEUIL.
(FOURNIR LE NUMÉRO DE SÉRIE DU FAUTEUIL SVP)

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0031263A-00	CLAMP PIVOTANTE	2
2	0031265A-00	BANDE ADHESIVE UHMW	2
3	0031262A-00	MANCHON À BRIDE	2
4	0031264A-00	CLAMP AJUSTEMENT EN ANGLE	2
5	0090724A-00	VIS TÊTE CYLIND M4x0.7x10mm L	2
6	0090863A-00	VIS TÊTE FRAISÉE M6x1x10mm L	2
7	0090744A-00	VIS TÊTE CYLIND M5x0.8x12mm L	2
8*	0070392B-00	TUBE ALU 19.05mm OD, 2mm ÉPAIS, 1500mm L NOIR	1

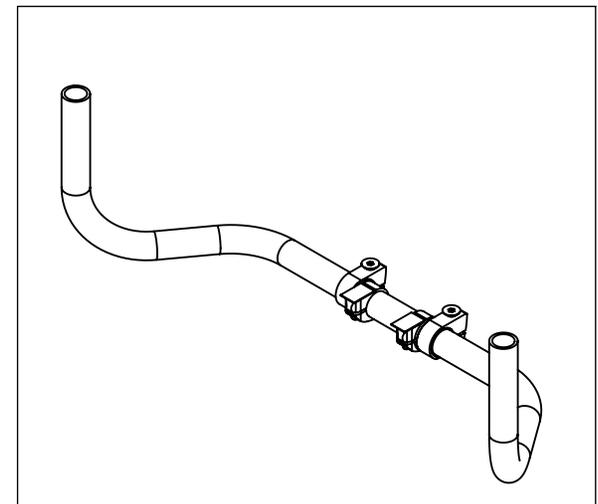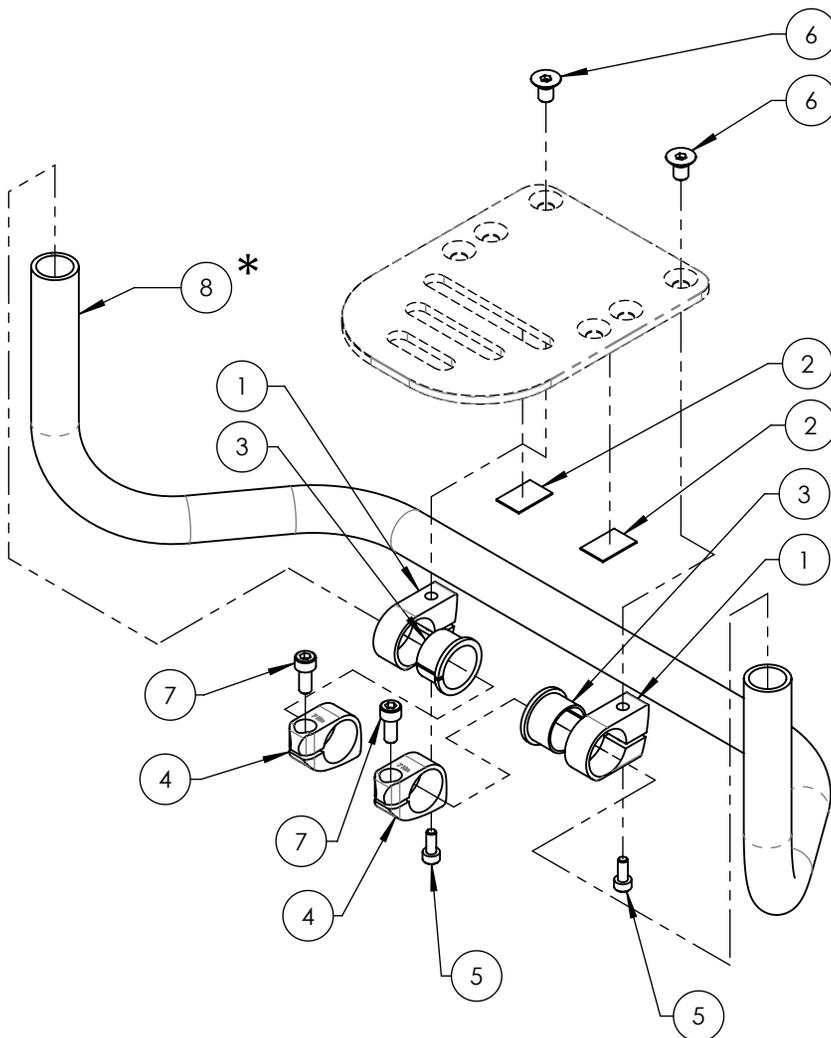



ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9007807A-00
STRUCTURE - PALETTE PLEINE LARGEUR

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTY.
1	0031116A-00	EXTRUSION SIMPLE PALETTE AJUSTABLE ANGLE	2
2*	0070392B-00	TUBE ALU 19.05mm OD, 2mm ÉPAIS, 1500mm L NOIR	1


*NOTE: CONTACTEZ NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE
AVANT DE COMMANDER LA STRUCTURE DE PALETTE (#0070392B-00)

L'ARTICLE DOIT ÊTRE USINÉ PAR MOTION COMPOSITES
SELON LES SPÉCIFICATIONS DU FAUTEUIL.
(FOURNIR LE NUMÉRO DE SÉRIE DU FAUTEUIL SVP)

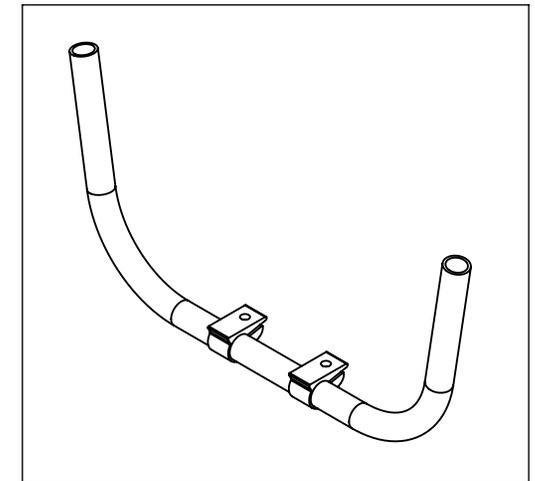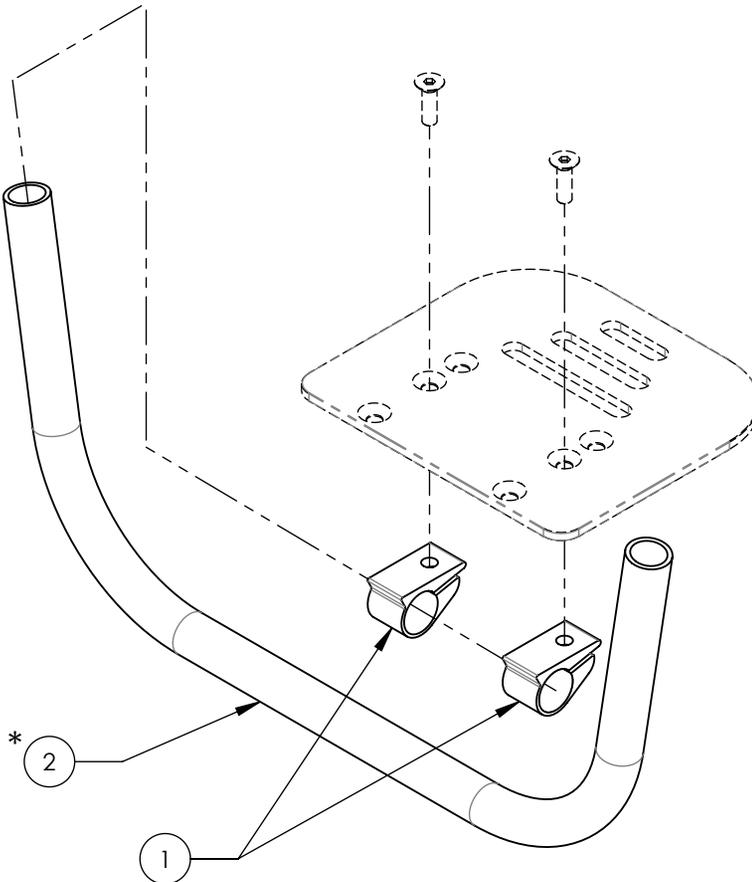

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9007819A
MONTAGE HAUT - STRUCTURE, RF

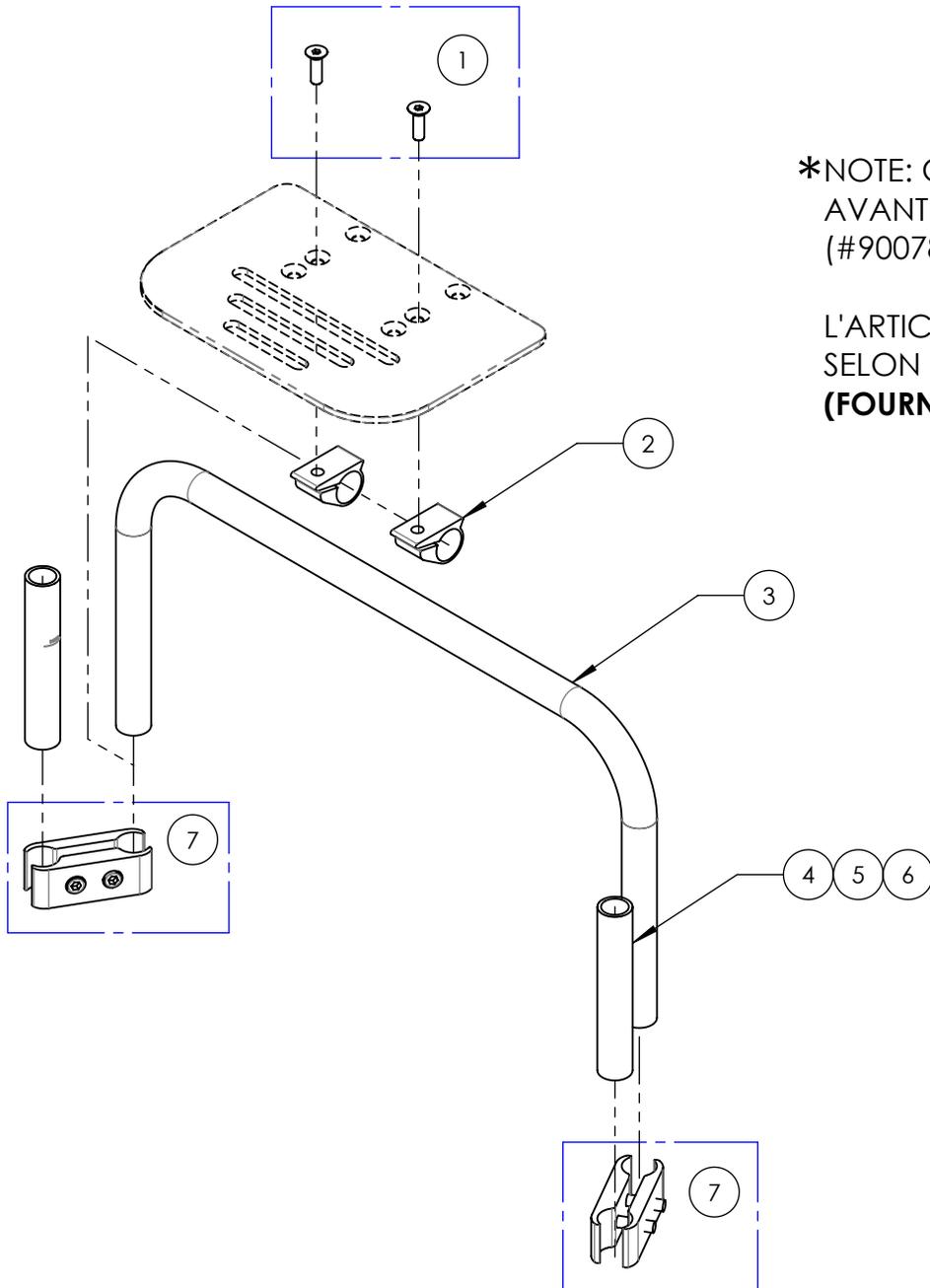


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	-00	-01	-02
1	9010380A-00	QUINCAILLERIE - POUR PALETTE PLEINE LARGEUR	1	1	1
2	0031116A-00	EXTRUSION SIMPLE PALETTE AJUSTABLE ANGLE	2	2	2
3	0070392B-00	TUBE ALU 19.05mm OD, 2mm ÉPAIS, 1500mm L NOIR	1	1	1
4	0001035A-00	EXTENSION DROITE MONTAGE HAUT	2	-	-
5	0003126A-00	MONTAGE HAUT - EXTENSION 4.5°	-	2	-
6	0003126A-01	MONTAGE HAUT - EXTENSION 9°	-	-	2
7	0041502A-00	BAGUE 0.75-0.75po - ASSY	2	2	2


***NOTE: CONTACTEZ NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE AVANT DE COMMANDER LA STRUCTURE DE PALETTE (#9007819A)**

**L'ARTICLE DOIT ÊTRE USINÉ PAR MOTION COMPOSITES SELON LES SPÉCIFICATIONS DU FAUTEUIL.
 (FOURNIR LE NUMÉRO DE SÉRIE DU FAUTEUIL SVP)**


9007819A-00
 MONTAGE HAUT - STRUCTURE, RF, 0°

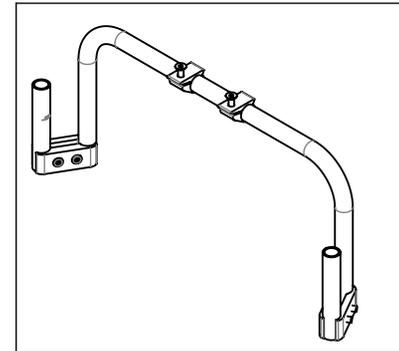

9007819A-01
 MONTAGE HAUT - STRUCTURE, RF, 4.5°

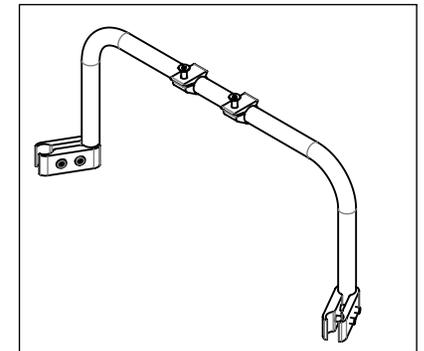

9007819A-02
 MONTAGE HAUT - STRUCTURE, RF, 9°

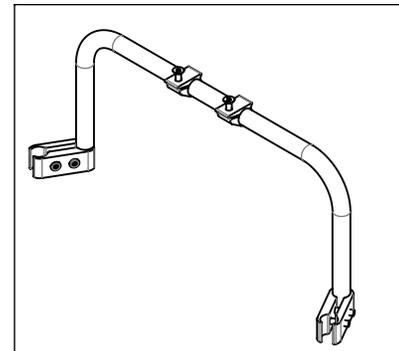

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

Catalogue d'appui-pieds
Supports d'appui-mollets Bodypoint Aeromesh




No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	9007795A-00	COURROIE - APPUI-MOLLET, BODYPOINT AEROMESH, PETIT	1
2	9007796A-00	COURROIE - APPUI-MOLLET, BODYPOINT AEROMESH, MOYEN	1
3	9007797A-00	COURROIE - APPUI-MOLLET, BODYPOINT AEROMESH, GRAND	1
4	9007798A-00	PANNEAU - APPUI-MOLLET, BODYPOINT AEROMESH, PETIT	1
5	9007799A-00	PANNEAU - APPUI-MOLLET, BODYPOINT AEROMESH, MOYEN	1
6	9007800A-00	PANNEAU - APPUI-MOLLET, BODYPOINT AEROMESH, GRAND	1



Catalogue d'appui-pieds
Courroies d'appui-mollets

PLAGE DE LARGEUR	LONGUEUR DÉPLIÉE
12-14" (30.5 - 35.6cm)	27.5" (69.9cm)
15-17" (38.1 - 43.2cm)	34" (86.4cm)
18-22" (45.7 - 55.9cm)	40.5" (102.9cm)

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0031159A-00	COURROIE APPUI-MOLLETS SIMPLE 12-14 po	1
2	0031046A-00	COURROIE APPUI-MOLLETS SIMPLE 15-17 po	1
3	0031047A-00	COURROIE APPUI-MOLLETS SIMPLE 18-22 po	1
4	0031293A-00	COURROIE APPUI-MOLLETS DOUBLE 12-14 po	1
5	0031281A-00	COURROIE APPUI-MOLLETS DOUBLE 15-17 po	1
6	0031282A-00	COURROIE APPUI-MOLLETS DOUBLE 18-20 po	1
7	9001414A-00	COURROIE - APPUI-MOLLET REMBOURRÉE, MOYEN	1
8	9001415A-00	COURROIE - APPUI-MOLLET REMBOURRÉE, GRAND	1

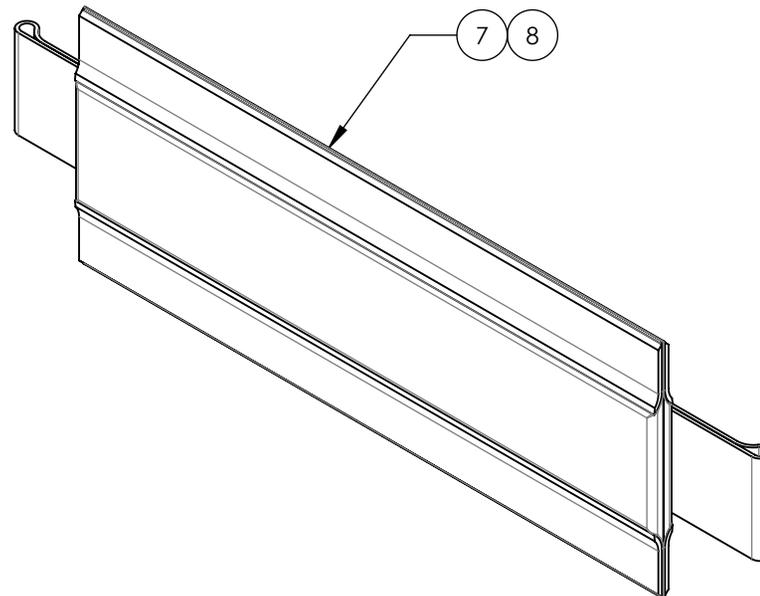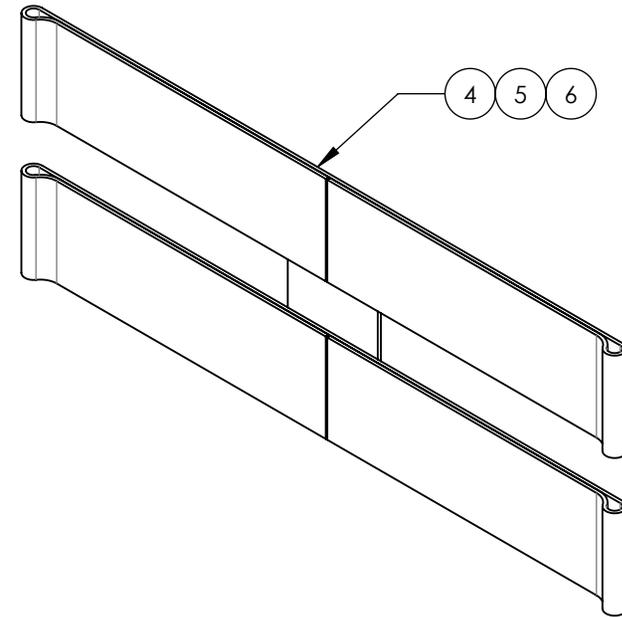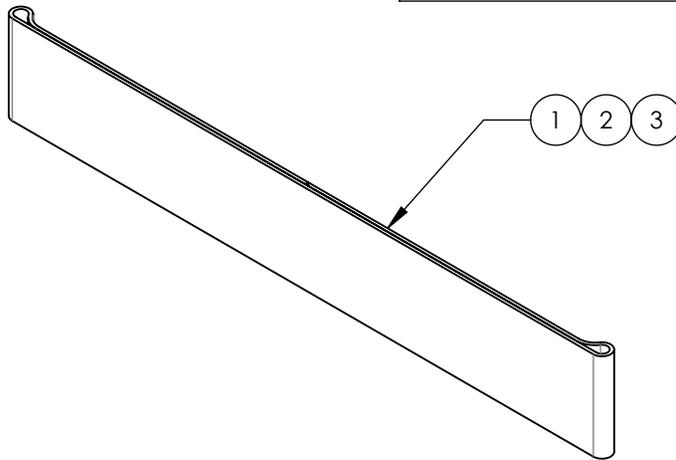











ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

CATALOGUE D'APPUIE-PIEDS
APPUIE-PIEDS À TUBE OUVERT

*NOTE: CONTACTEZ NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE AVANT DE COMMANDER UN APPUI-PIED TUBULAIRE OUVERT (#9003375A-00 à #9003385A-00)

L'ARTICLE DOIT ÊTRE USINÉ PAR MOTION COMPOSITES SELON LES SPÉCIFICATIONS DU FAUTEUIL (FOURNIR LE NUMÉRO DE SÉRIE DU FAUTEUIL SVP)

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	9003375A-00 *	Tube ouvert - 4x4.75po (Indiquer N/S)	1
2	9003376A-00 *	Tube ouvert - 6x4.75po (Indiquer N/S)	1
3	9003377A-00 *	Tube ouvert - 8x4.75po (Indiquer N/S)	1
4	9003378A-00 *	Tube ouvert - 10x4.75po (Indiquer N/S)	1
5	9003379A-00 *	Tube ouvert - 12x4.75po (Indiquer N/S)	1
6	9003381A-00 *	TUBE OUVERT - PLAQUE ABS, 4x4.75po (INDIQUER N/S)	1
7	9003382A-00 *	TUBE OUVERT - PLAQUE ABS, 6x4.75po (INDIQUER N/S)	1
8	9003383A-00 *	TUBE OUVERT - PLAQUE ABS, 8x4.75po (INDIQUER N/S)	1
9	9003384A-00 *	TUBE OUVERT - PLAQUE ABS, 10x4.75po (INDIQUER N/S)	1
10	9003385A-00 *	TUBE OUVERT - PLAQUE ABS, 12x4.75po (INDIQUER N/S)	1

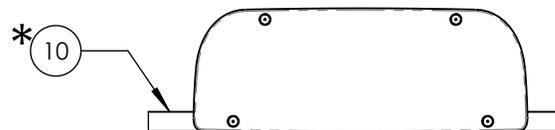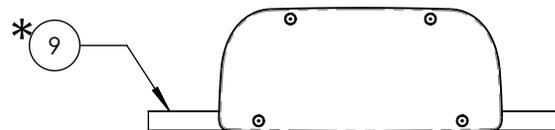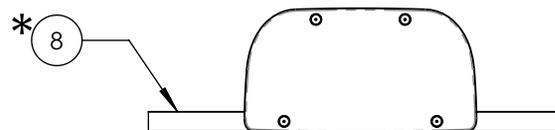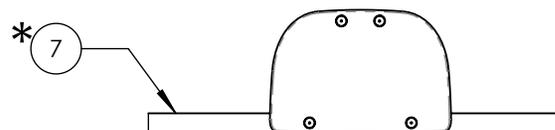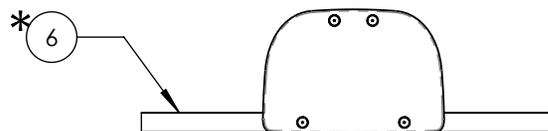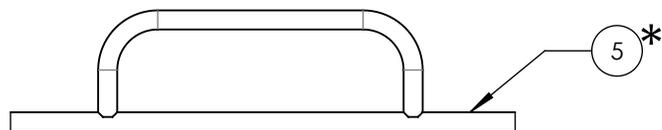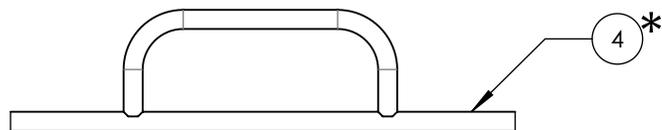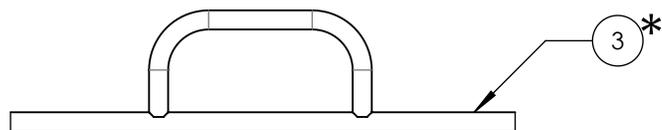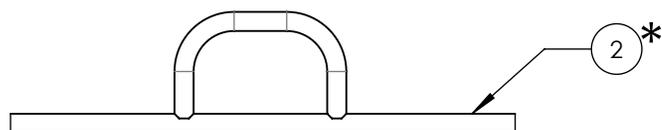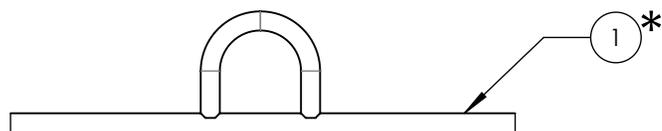


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

Catalogue d'appui-pieds
Palettes pleine largeur


DIMENSION PALETTE	LARGEUR FAUTEUIL
4x5.5po	12 to 13po
6x5.5po	14 to 16po
8x5.5po	17 to 18po
10x5.5po	19 to 20po
12x5.5po	21 to 22po

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0031127A-00	PALETTE CARBONE PLATEFORME 6po	1
2	0031128A-00	PALETTE CARBONE PLATEFORME 8po	1
3	0031129A-00	PALETTE CARBONE PLATEFORME 10po	1
4	0031130A-00	PALETTE CARBONE PLATEFORME 12po	1
5	0031088A-00	PALETTE ALUMINIUM PLATEFORME 4po	1
6	0031089A-00	PALETTE ALUMINIUM PLATEFORME 6po	1
7	0031090A-00	PALETTE ALUMINIUM PLATEFORME 8po	1
8	0031091A-00	PALETTE ALUMINIUM PLATEFORME 10po	1
9	0031092A-00	PALETTE ALUMINIUM PLATEFORME 12po	1

PALETES PLEINE LARGEUR CARBONE


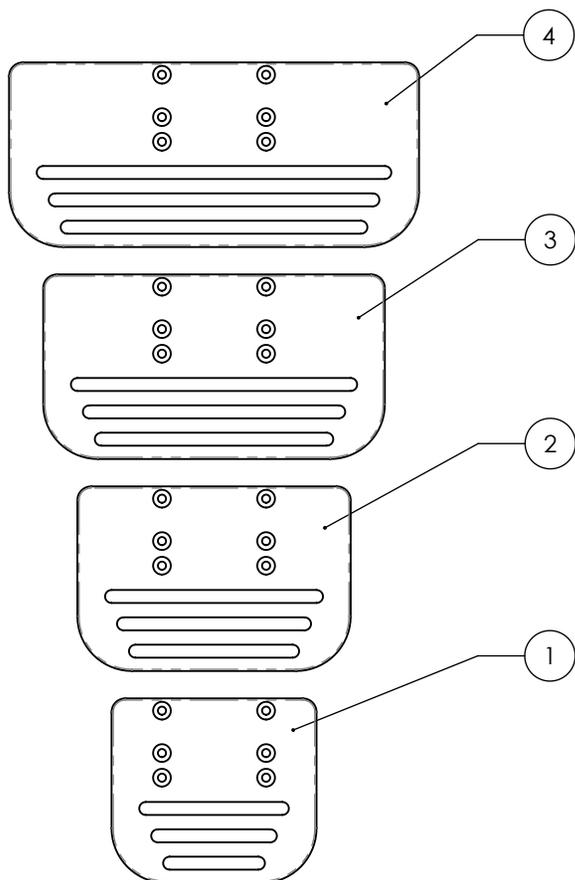


PALETES PLEINE LARGEUR ALUMINIUM

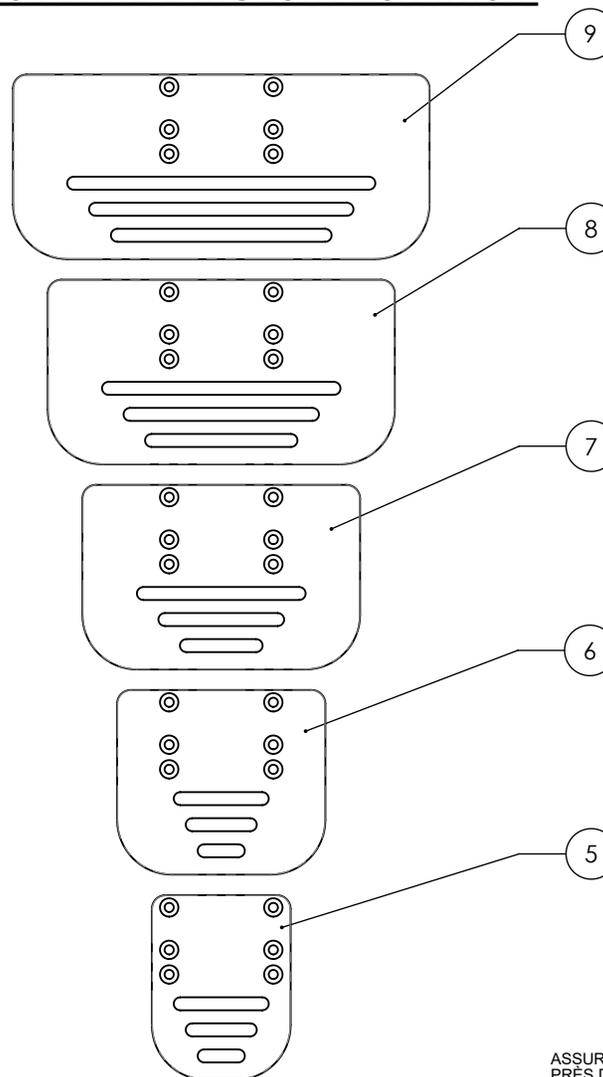


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

Catalogue d'appuie-pieds
Structures de palette pleine largeur

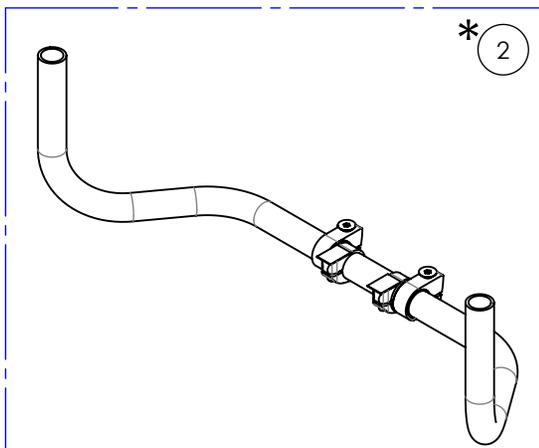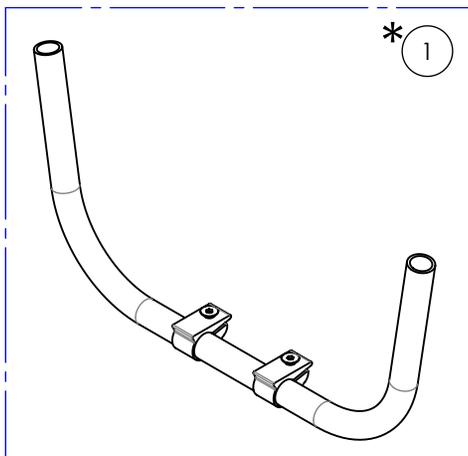


*NOTE: CONTACTEZ NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE AVANT DE COMMANDER L'UNE DES STRUCTURES DE PALETTE PLEINE LARGEUR (#9007801A-00, #9007802A-00 & #9007819A)

L'ARTICLE DOIT ÊTRE USINÉ PAR MOTION COMPOSITES SELON LES SPÉCIFICATIONS DU FAUTEUIL.
(FOURNIR LE NUMÉRO DE SÉRIE DU FAUTEUIL SVP)

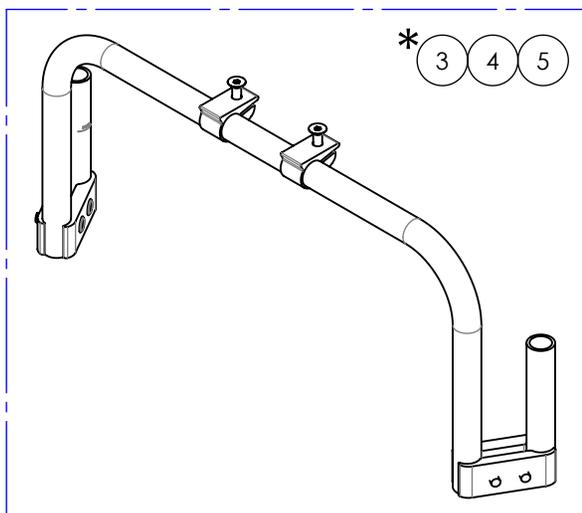

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1*	9007801A-00	STRUCTURE - ASSEMBLAGE PALETTE PLEINE LARGEUR	1
2*	9007802A-00	STRUCTURE - RABATTABLE, PALETTE PLEINE LARGEUR	1
3*	9007819A-00	MONTAGE HAUT - STRUCTURE, RF, 0°	1
4*	9007819A-01	MONTAGE HAUT - STRUCTURE, RF, 4.5°	1
5*	9007819A-02	MONTAGE HAUT - STRUCTURE, RF, 9°	1
6**	9003411A-00	ÉLÉVATEUR - POUR PALETTE PLEINE LARGEUR, 2po	1

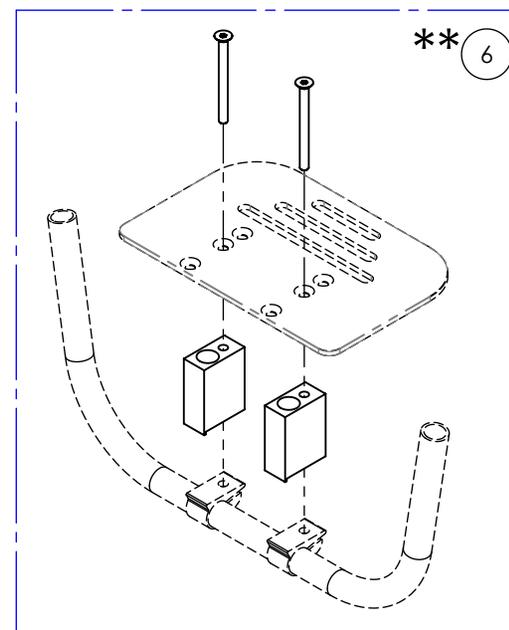


**NOTE:


1. UNIQUEMENT DISPONIBLE AVEC LES PALETTES PLEINE LARGEUR EN ALUMINIUM (VOIR #0031088A-00 À #0031092A-00)
2. INCOMPATIBLE AVEC LES STRUCTURES DE MONTAGE HAUT (#9007819A)

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

0051523A_0051533A
Poignée poussette

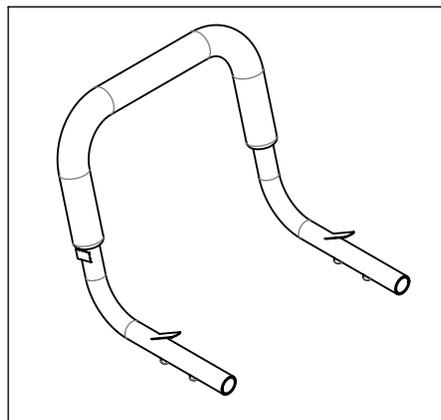

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	0051523 / QTE.	0051524 / QTE.	0051525 / QTE.	0051526 / QTE.	0051527 / QTE.	0051528 / QTE.	0051529 / QTE.	0051530 / QTE.	0051531 / QTE.	0051532 / QTE.	0051533 / QTE.
1	0051226A-00	BOUTON POUSSOIR DOUBLE POUR POIGNÉE DE POUSSETTE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	0070780A-00	ÉTIQUETTE ADHÉSIVE BLANCHE VOID 1.33X%po	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	0051077A-00	STRUCTURE POIGNÉE POUSSETTE 10po	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0051594A-00	GARNITURE POIGNÉE POUSSETTE 10po	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	0051078A-00	STRUCTURE POIGNÉE POUSSETTE 11po	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	0051595A-00	GARNITURE POIGNÉE POUSSETTE 11po	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	0051079A-00	STRUCTURE POIGNÉE POUSSETTE 12po	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
8	0051596A-00	GARNITURE POIGNÉE POUSSETTE 12po	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
9	0051080A-00	STRUCTURE POIGNÉE POUSSETTE 13po	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
10	0051597A-00	GARNITURE POIGNÉE POUSSETTE 13po	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
11	0051081A-00	STRUCTURE POIGNÉE POUSSETTE 14po	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
12	0051598A-00	GARNITURE POIGNÉE POUSSETTE 14po	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
13	0051082A-00	STRUCTURE POIGNÉE POUSSETTE 15po	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
14	0051599A-00	GARNITURE POIGNÉE POUSSETTE 15po	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
15	0051083A-00	STRUCTURE POIGNÉE POUSSETTE 16po	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
16	0051600A-00	GARNITURE POIGNÉE POUSSETTE 16po	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
17	0051084A-00	STRUCTURE POIGNÉE POUSSETTE 17po	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
18	0051601A-00	GARNITURE POIGNÉE POUSSETTE 17po	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
19	0051085A-00	STRUCTURE POIGNÉE POUSSETTE 18po	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
20	0051602A-00	GARNITURE POIGNÉE POUSSETTE 18po	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
21	0051086A-00	STRUCTURE POIGNÉE POUSSETTE 19po	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
22	0051603A-00	GARNITURE POIGNÉE POUSSETTE 19po	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
23	0051087A-00	STRUCTURE POIGNÉE POUSSETTE 20po	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
24	0051604A-00	GARNITURE POIGNÉE POUSSETTE 20po	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

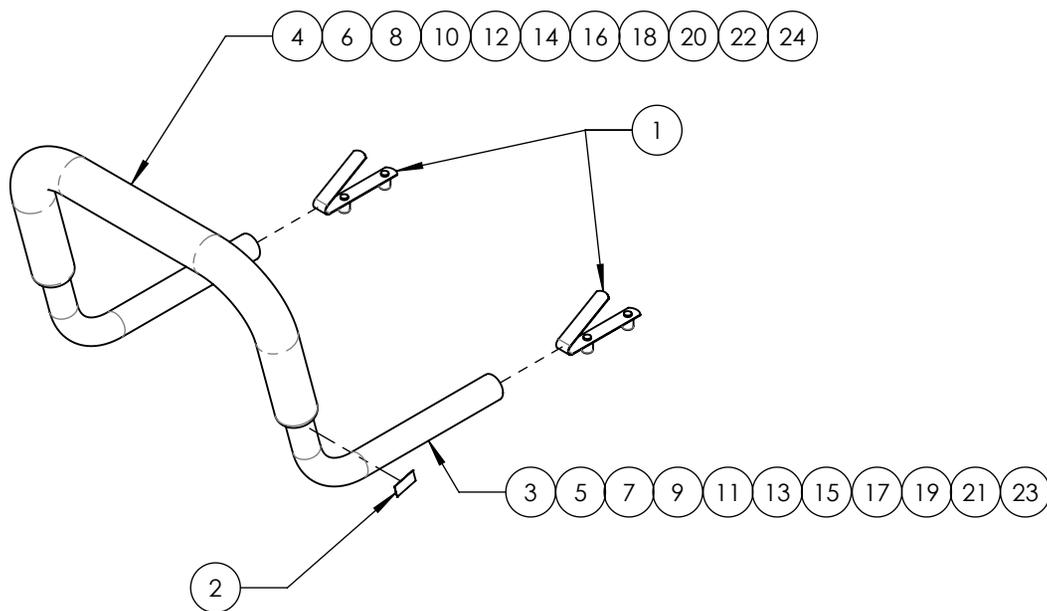

AVERTISSEMENT important sur les poignées de poussette




Les poignées de poussette n'ont pas été conçues pour soulever ou tirer le poids d'un utilisateur dans son fauteuil roulant. Cet accessoire est conçu pour pousser et guider l'utilisateur dans son fauteuil.


Soulever ou tirer le poids d'un utilisateur dans son fauteuil roulant peut résulter à un bris des poignées de poussée et causer des blessures graves
(SVP VOUS RÉFÉRER AU MANUEL D'UTILISATEUR)

**9001285A & 9002915A
POIGNÉE DE POUSSÉE - AJUSTABLE**


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9001285	9002915	REPLACEMENT PIÈCES
1	0032507B-00	POIGNÉE DE POUSSÉE ¾po - ASSY	1	-	-
2	0032533A-00	POIGNÉE DE POUSSÉE HD ¾po - ASSY	-	1	-
3	0032017B-00	MANCHON POIGNÉE DE POUSSÉE	1	1	-
4	0032514B-00	DOWEL NUT POIGNÉE DE POUSSÉE - ASSEMBLAGE (M)	-	-	1

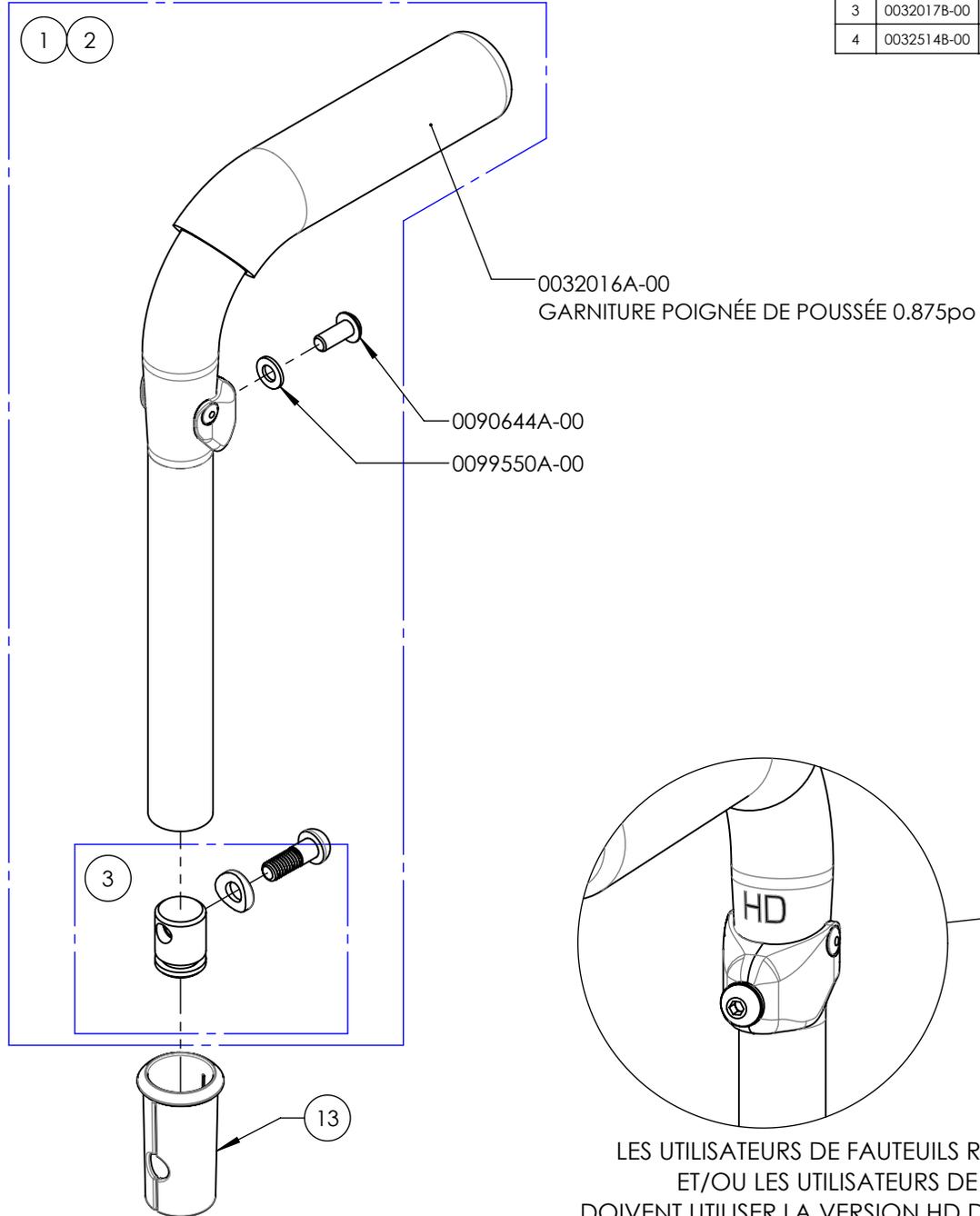

9001285A-00
POIGNÉE DE POUSSÉE - STD

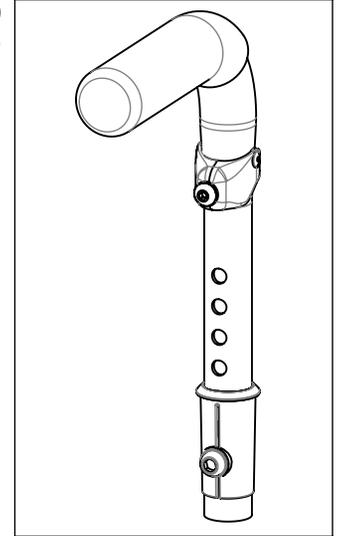

9002915A-00
POIGNÉE DE POUSSÉE - HD


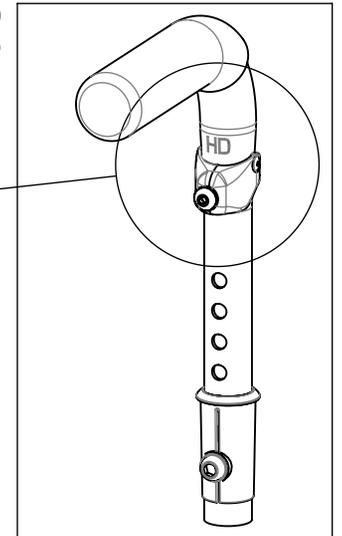


LES UTILISATEURS DE FAUTEUILS ROULANTS HAUTE CAPACITÉ
ET/OU LES UTILISATEURS DE LA POIGNÉE DE POUSSETTE
DOIVENT UTILISER LA VERSION HD DE LA POIGNÉE DE POUSSÉE

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9001286A-00
EXTENSION DROITE AJUST


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ	REPLACEMENT PIÈCES
1	0032506B-00	EXTENSION DE DOSSIER DROITE - ASSY	1	-
2	0032017B-00	MANCHON POIGNÉE DE POUSSÉE	1	-
3	0032514B-00	DOWEL NUT POIGNÉE DE POUSSÉE - ASSEMBLAGE (M)	-	1

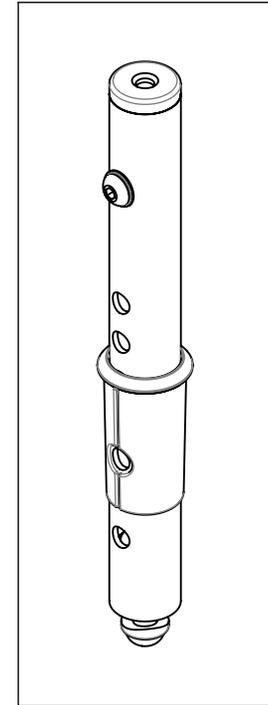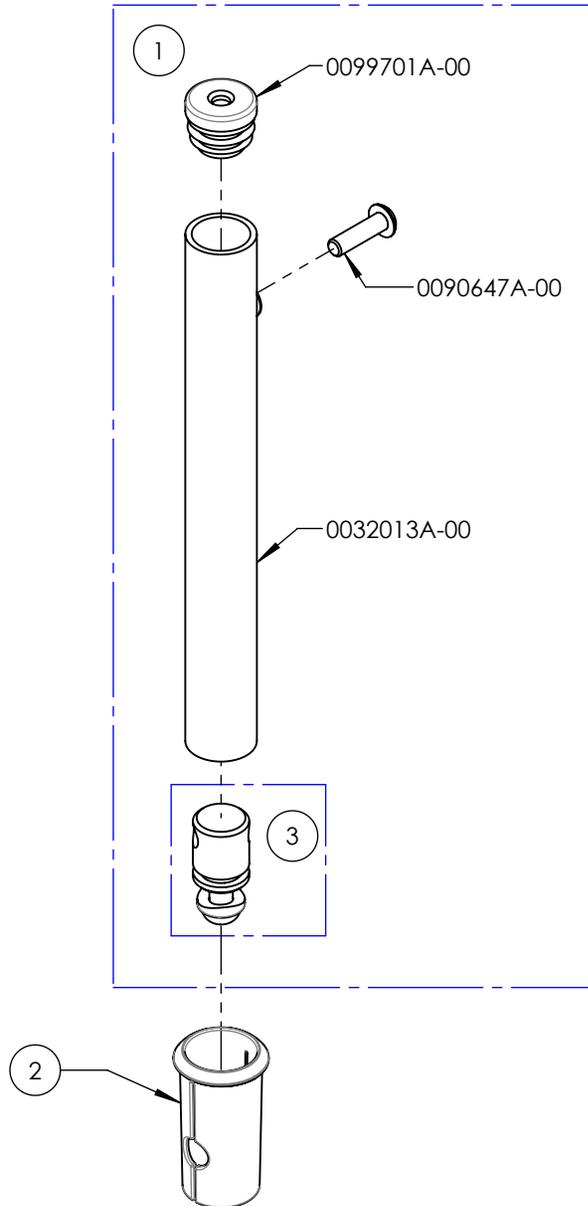


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9003095A-00
POIGNÉE DE POUSSÉE - RABATTABLE

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ	REPLACEMENT PIÈCES
1	0032542A-00	POIGNÉE DE POUSSÉE RABATTABLE - ASSY	1	-
2	0032017B-00	MANCHON POIGNÉE DE POUSSÉE	1	-
3	0032514B-00	DOWEL NUT POIGNÉE DE POUSSÉE - ASSEMBLAGE (M)	-	1

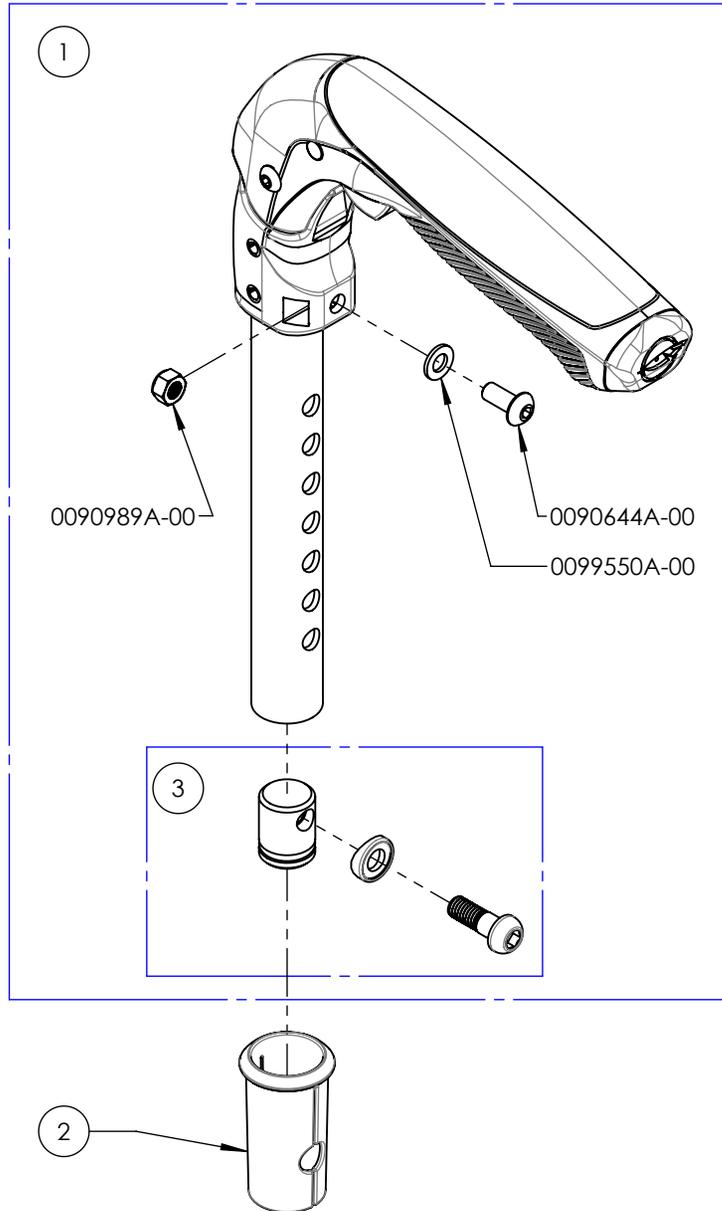


9003095A-00
 POIGNÉE DE POUSSÉE - RABATTABLE

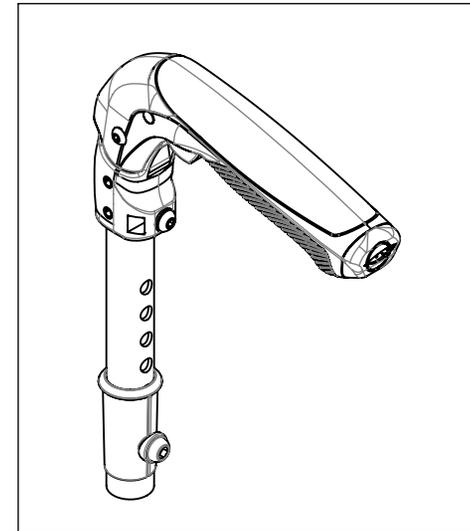

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9003127A-00
DOSSIER - RABATTABLE AVEC VERROUILLAGE, DROITE, AJUSTABLE EN ANGLE & PROFONDEUR

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0032534A-00	DOSSIER RABATABLE AJUST EN ANGLE, DROITE - ASSY	1

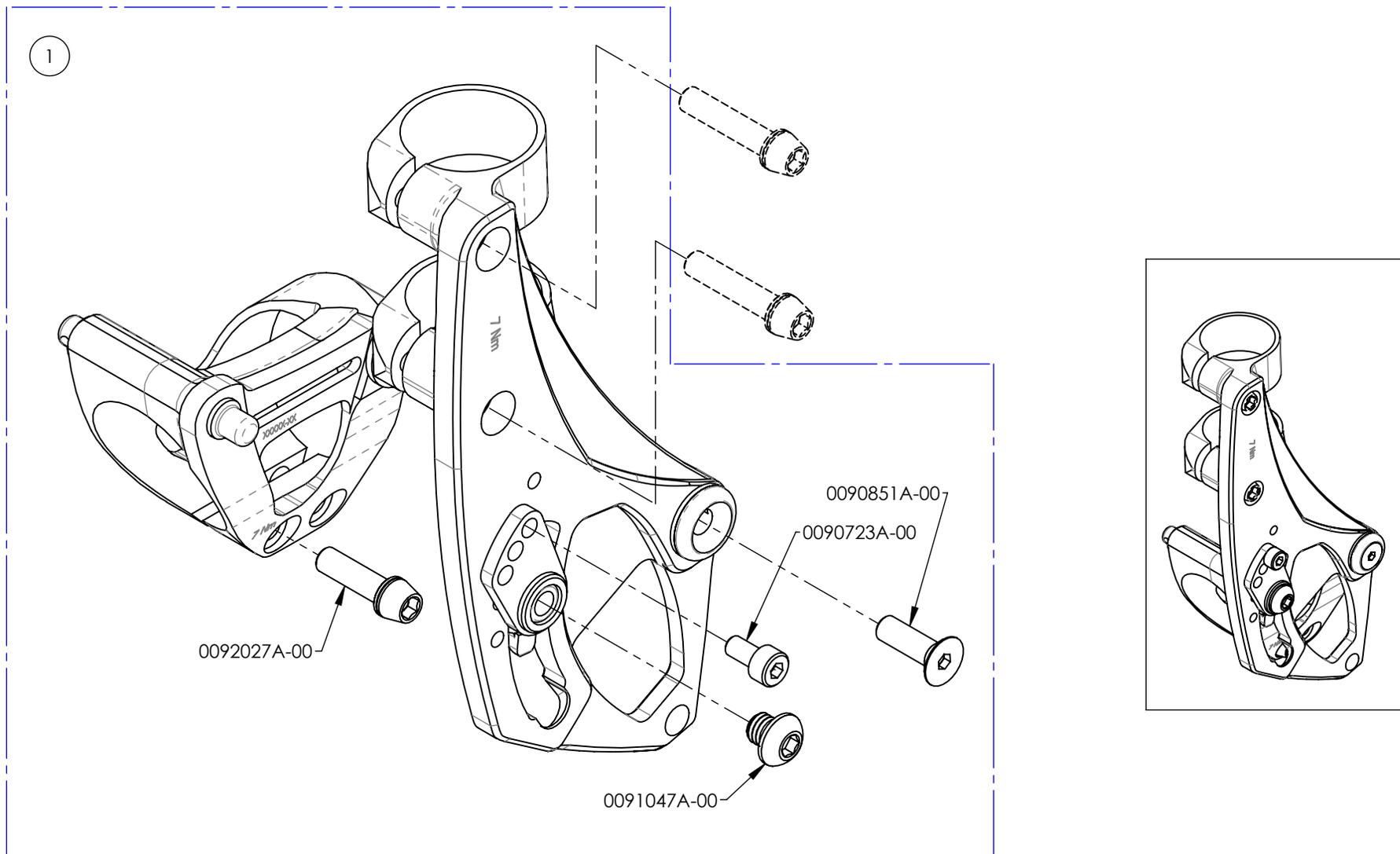


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9003128A-00

DOSSIER - RABATTABLE AVEC VERROUILLAGE, GAUCHE, AJUSTABLE EN ANGLE & PROFONDEUR



No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0032535A-00	DOSSIER RABATABLE AJUST EN ANGLE, GAUCHE - ASSY	1

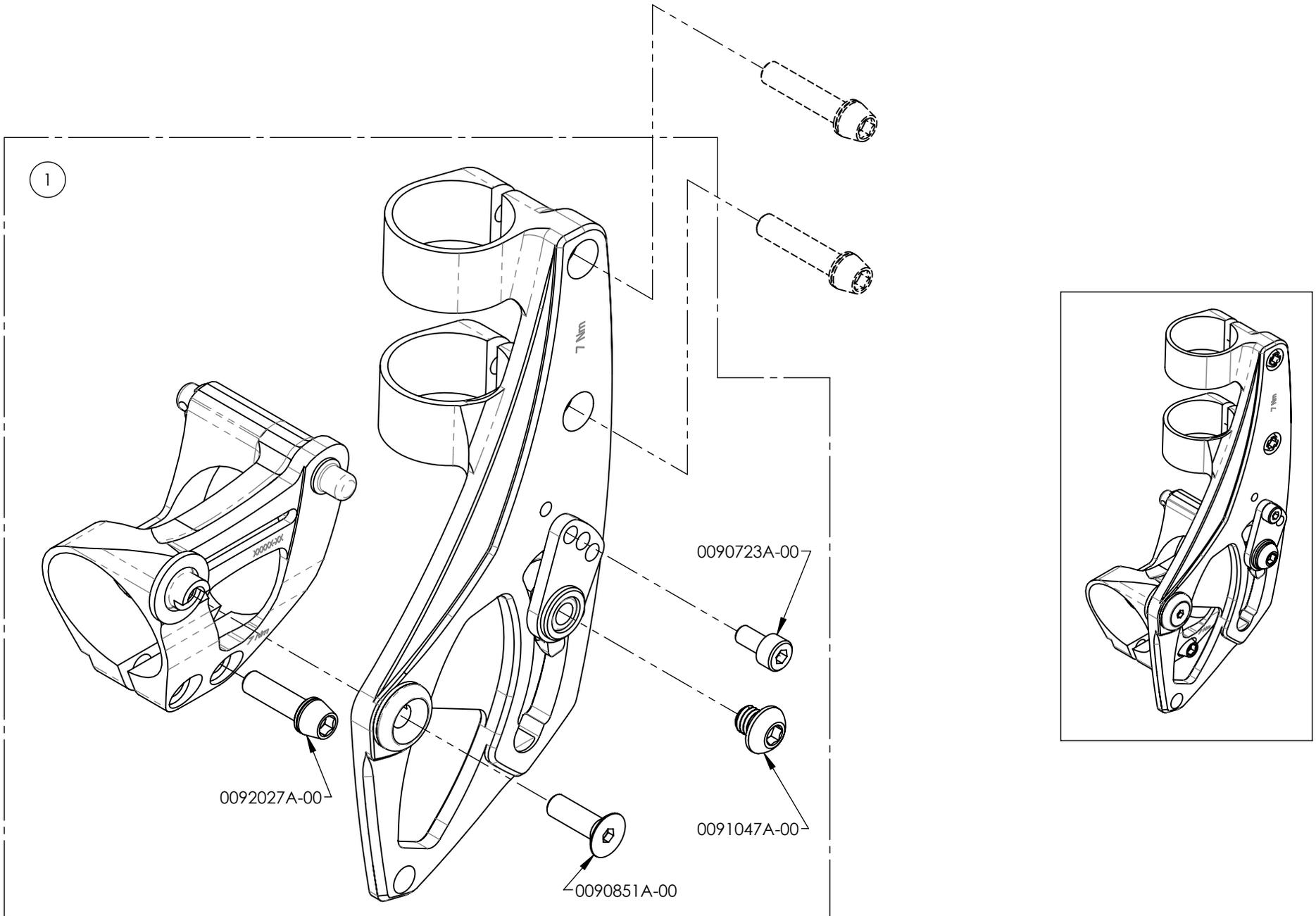

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9003129A-00
DOSSIER - ULTRALÉGER, RABATTABLE SANS VERROUILLAGE, DROITE,
AJUSTABLE EN PROFONDEUR



No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0032536A-00	DOSSIER ULTRALÉGER RABATTABLE, DROITE - ASSY	1

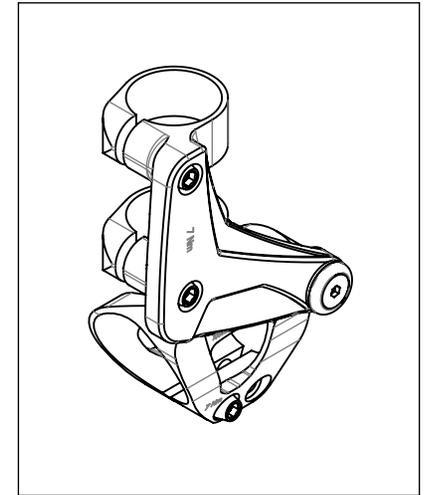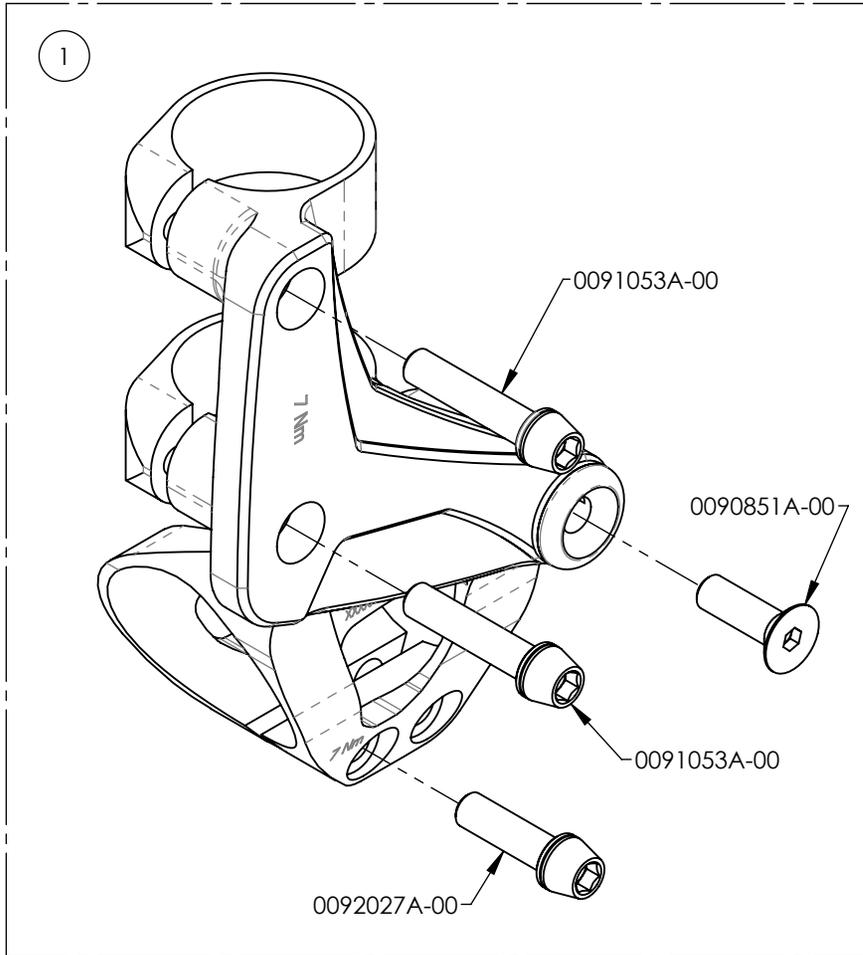

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9003130A-00
DOSSIER - ULTRALÉGER, RABATTABLE SANS VERROUILLAGE, GAUCHE,
AJUSTABLE EN PROFONDEUR


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0032537A-00	DOSSIER ULTRALÉGER RABATTABLE, GAUCHE - ASSY	1

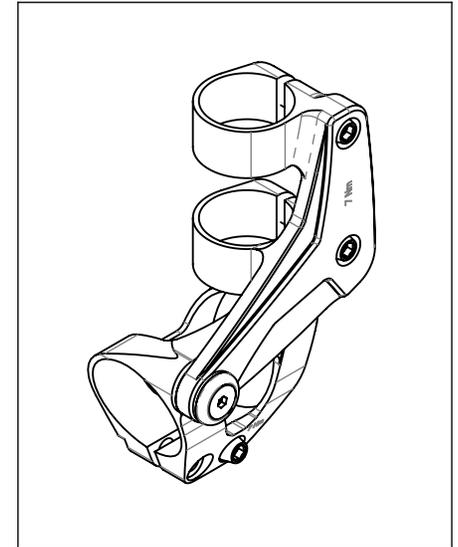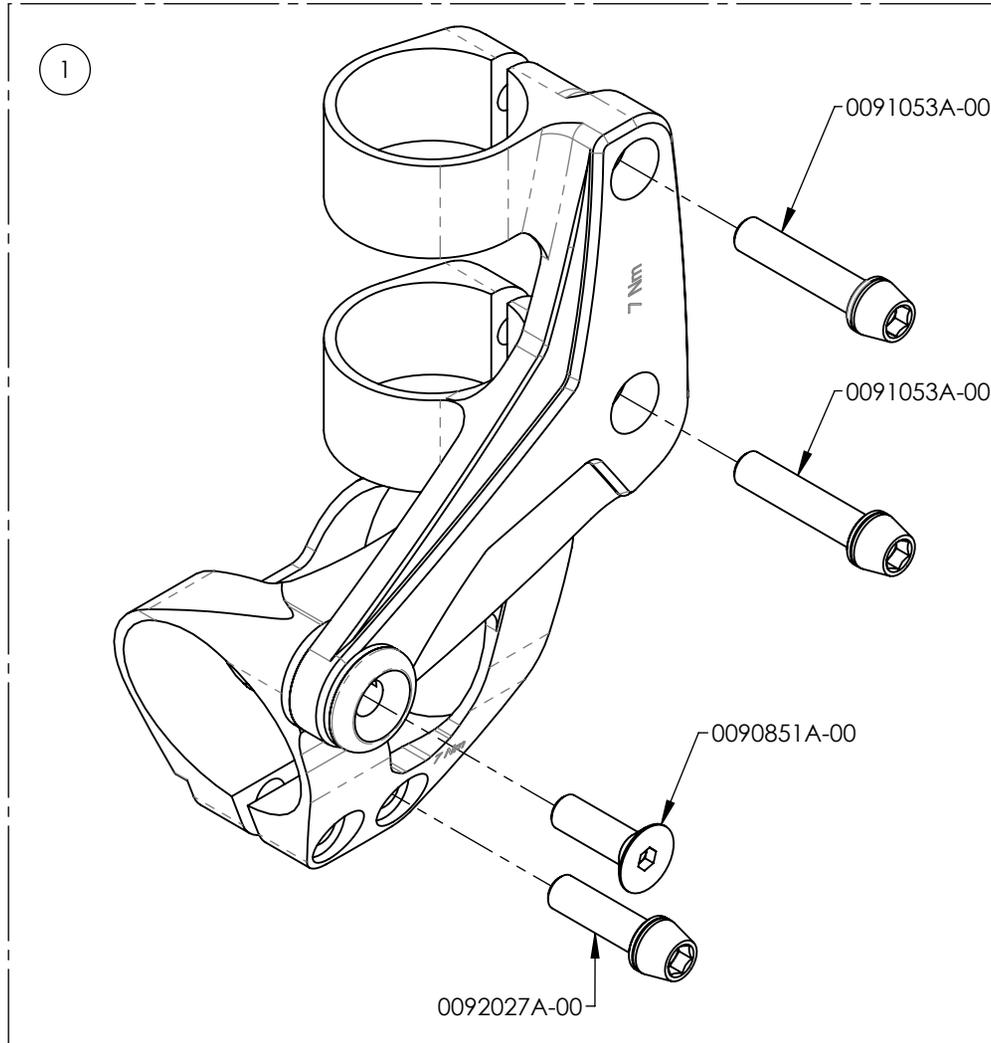

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9003131A 9003143A
RAIDISSEUR SIÈGE ARRIÈRE -
PULTRUSION FIBRE DE CARBONE**



No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9003131	9003132	9003133	9003134	9003135	9003136	9003137	9003138	9003139	9003140	9003141
1	0010721A-00	RAIDISSEUR DE SIÈGE ARRIÈRE 10po	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0010722A-00	RAIDISSEUR DE SIÈGE ARRIÈRE 11po	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	0010723A-00	RAIDISSEUR DE SIÈGE ARRIÈRE 12po	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0010724A-00	RAIDISSEUR DE SIÈGE ARRIÈRE 13po	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5	0010725A-00	RAIDISSEUR DE SIÈGE ARRIÈRE 14po	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
6	0010726A-00	RAIDISSEUR DE SIÈGE ARRIÈRE 15po	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
7	0010727A-00	RAIDISSEUR DE SIÈGE ARRIÈRE 16po	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
8	0010728A-00	RAIDISSEUR DE SIÈGE ARRIÈRE 17po	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
9	0010729A-00	RAIDISSEUR DE SIÈGE ARRIÈRE 18po	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
10	0010730A-00	RAIDISSEUR DE SIÈGE ARRIÈRE 19po	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
11	0010731A-00	RAIDISSEUR DE SIÈGE ARRIÈRE 20po	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
12	0090751A-00	VIS TÊTE CYLIND M5x0.8x25mm L	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

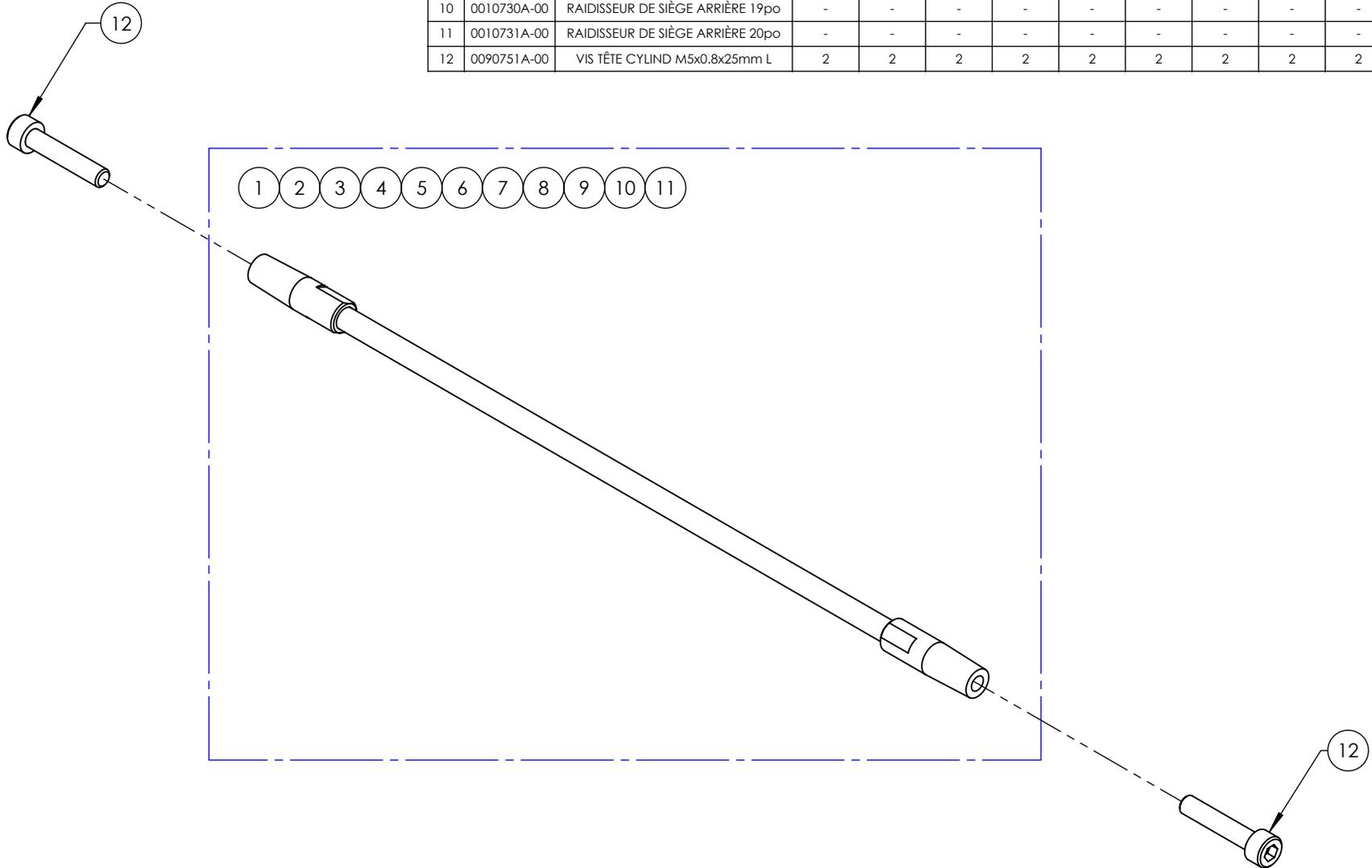

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


9003254A-00
DOSSIER - ULTRALÉGER, BOUCHON

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0032102A-00	BOUCHON POUR DOSSIER	1
2	0032121A-00	O-RING 2.7mm LARG, 15.1mm ID	2

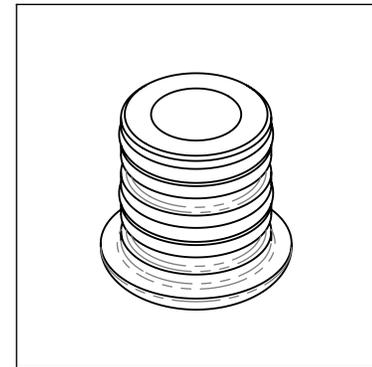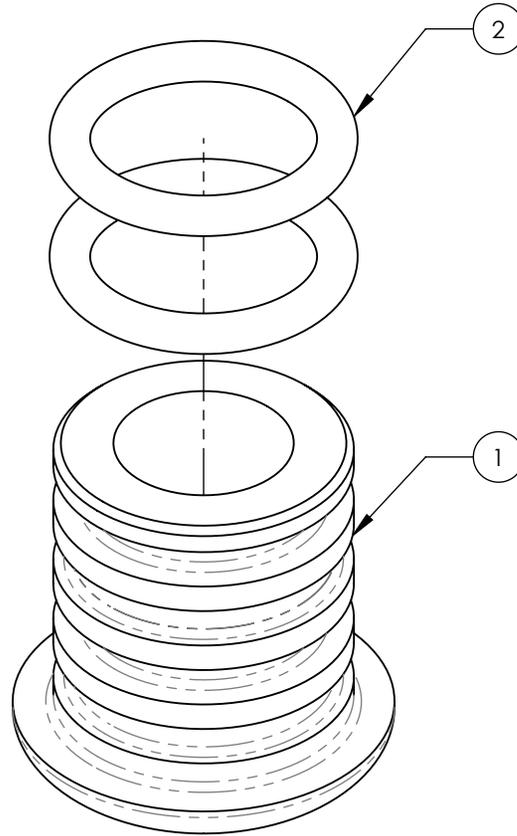


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9003255A_9003265A
DOSSIER - CORDON À DÉCLENCHEMENT RAPIDE

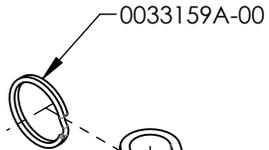

9003255A-00
DOSSIER - CORDON À DÉCLENCHEMENT
RAPIDE, 10PO

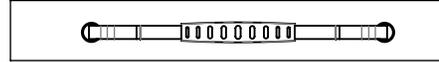

9003256A-00
DOSSIER - CORDON À DÉCLENCHEMENT
RAPIDE, 11PO



9003257A-00
DOSSIER - CORDON À DÉCLENCHEMENT RAPIDE, 12PO




9003258A-00
DOSSIER - CORDON À DÉCLENCHEMENT RAPIDE, 13PO




9003259A-00
DOSSIER - CORDON À DÉCLENCHEMENT RAPIDE, 14PO



9003260A-00
DOSSIER - CORDON À DÉCLENCHEMENT RAPIDE, 15PO

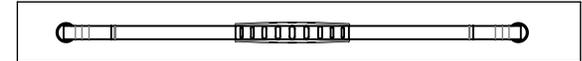


9003261A-00
DOSSIER - CORDON À DÉCLENCHEMENT RAPIDE, 16PO

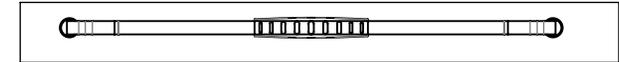

9003262A-00
DOSSIER - CORDON À DÉCLENCHEMENT RAPIDE, 17PO



9003263A-00
DOSSIER - CORDON À DÉCLENCHEMENT RAPIDE, 18PO

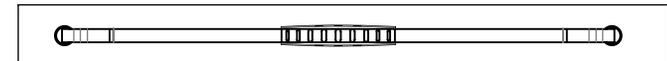

9003264A-00
DOSSIER - CORDON À DÉCLENCHEMENT RAPIDE, 19PO




9003265A-00
DOSSIER - CORDON À DÉCLENCHEMENT RAPIDE, 20PO



ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9003300A 9003301A
POIGNÉE DE POUSSÉE - AJUSTABLE EN HAUTEUR À ATTACHE RAPIDE

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9003300A-00	9003301A-00
1	0032543A-00	POIGNÉE DE POUSSÉE AJUST. EN HAUTEUR 16po - ASSY	1	-
2	0032544A-00	POIGNÉE DE POUSSÉE AJUST. EN HAUTEUR 19po - ASSY	-	1
3	0032545A-00	BATI POIGNÉE DE POUSSÉE AJUST HAUTEUR - ASSY	1	1
4	0070800A-00	INSTRUCTION - POIGNÉE AJUSTABLE EN HAUTEUR	1	1

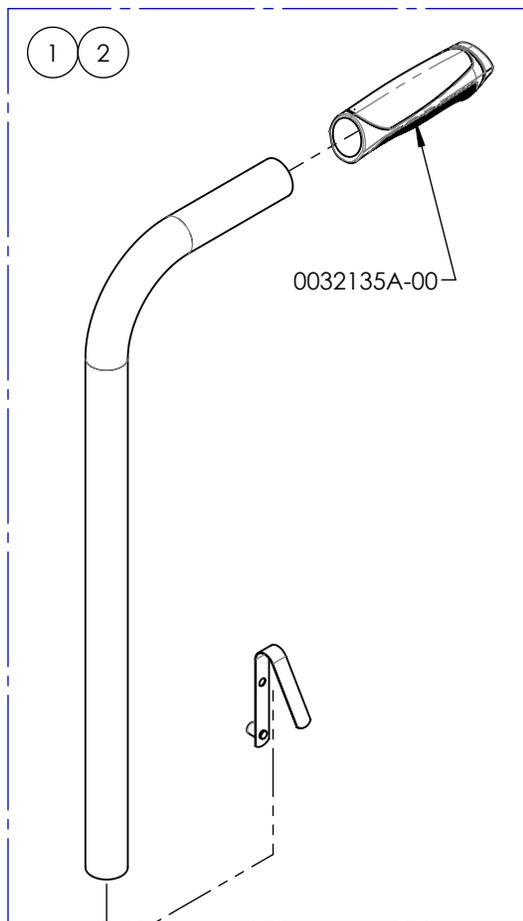

0032135A-00

**POUR FAUTEUIL AVEC POIDS MAXIMUM
 265 lbs (120 kg)**


LISTE D'INCOMPATIBILITÉS (TOUS LES FAUTEUILS):

- DOSSIERS AJUSTABLE EN PROFONDEUR (#9001278A À #9001284A)
- POIGNÉES DE POUSSÉE (#9001285A, #9002915A & #9003095A)

POUR FAUTEUILS APEX SEULEMENT:

- INCOMPATIBLE AVEC TOUS LES DOSSIERS 9-12po
- PLAGE D'AJUSTEMENT EN HAUTEUR LIMITÉE AVEC L'OPTION +3po DE DOSSIER RÉGLABLE EN PROFONDEUR OU AVEC L'OPTION DE L'ANCRAGE WC-19
- INCOMPATIBLE AVEC LES NUMÉROS DE SÉRIE AVANT #53830 SINON LA HAUTEUR DU RAIDISSEUR DE DOSSIER DOIT ÊTRE RÉAJUSTÉ PAR MOTION COMPOSITES


(SVP CONTACTER NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR LES INFOS)

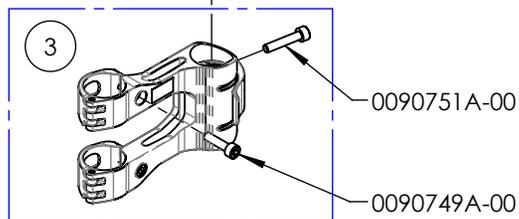


0090751A-00

0090749A-00

9003300A-00
 POIGNÉE DE POUSSÉE -
 AJUST EN HAUTEUR, 9-20po

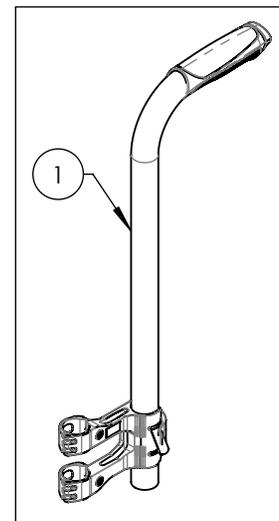


9003301A-00
 POIGNÉE DE POUSSÉE -
 AJUST EN HAUTEUR, 9-23po

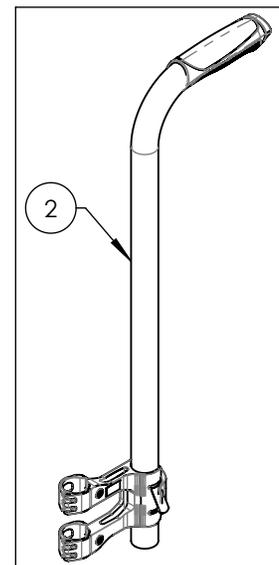

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


9004692B 9005026B
DOSSIER - ALU, 3po, VERROU, FIXE

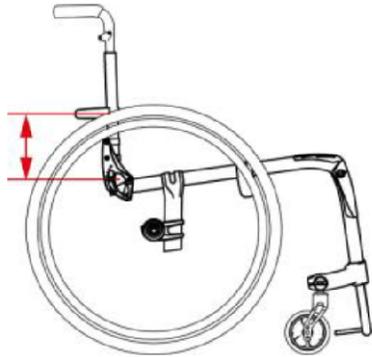

NOTE: VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR DÉTERMINER LA HAUTEUR DU RAIDISSEUR DE DOSSIER

Hauteur standard à 5.7 po (14.5cm)
 Position la plus basse à 4.25 po (10.8cm)


LES ARTICLES DOIVENT ÊTRE USINÉS ET ASSEMBLÉS PAR MOTION COMPOSITES

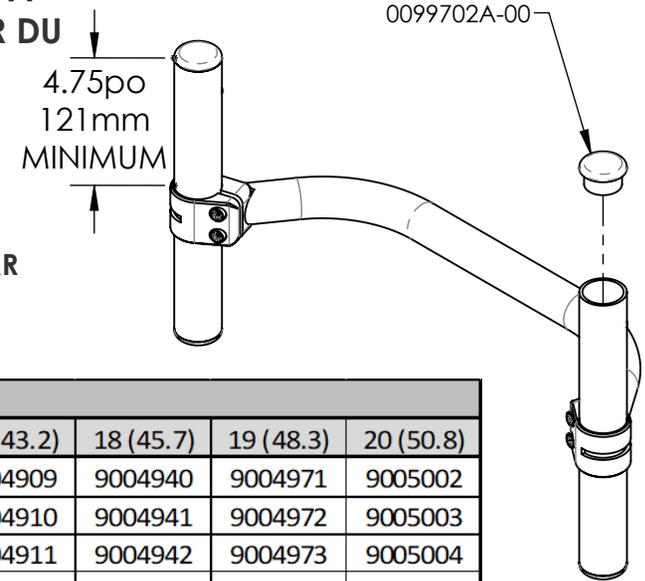

DIMENSIONS DE DOSSIERS		LARGEUR en pouces(cm)										
		10 (25.4)	11 (27.9)	12 (30.5)	13 (33.0)	14 (35.6)	15 (38.1)	16 (40.6)	17 (43.2)	18 (45.7)	19 (48.3)	20 (50.8)
HAUTEUR en pouces (cm)	9 (22.9)	9004692	9004723	9004754	9004785	9004816	9004847	9004878	9004909	9004940	9004971	9005002
	9.5 (24.1)	9004693	9004724	9004755	9004786	9004817	9004848	9004879	9004910	9004941	9004972	9005003
	10 (25.4)	9004694	9004725	9004756	9004787	9004818	9004849	9004880	9004911	9004942	9004973	9005004
	10.5 (26.7)	9004695	9004726	9004757	9004788	9004819	9004850	9004881	9004912	9004943	9004974	9005005
	11 (27.9)	9004696	9004727	9004758	9004789	9004820	9004851	9004882	9004913	9004944	9004975	9005006
	11.5 (29.2)	9004697	9004728	9004759	9004790	9004821	9004852	9004883	9004914	9004945	9004976	9005007
	12 (30.5)	9004698	9004729	9004760	9004791	9004822	9004853	9004884	9004915	9004946	9004977	9005008
	12.5 (31.8)	9004699	9004730	9004761	9004792	9004823	9004854	9004885	9004916	9004947	9004978	9005009
	13 (33)	9004700	9004731	9004762	9004793	9004824	9004855	9004886	9004917	9004948	9004979	9005010
	13.5 (34.3)	9004701	9004732	9004763	9004794	9004825	9004856	9004887	9004918	9004949	9004980	9005011
	14 (35.6)	9004702	9004733	9004764	9004795	9004826	9004857	9004888	9004919	9004950	9004981	9005012
	14.5 (36.8)	9004703	9004734	9004765	9004796	9004827	9004858	9004889	9004920	9004951	9004982	9005013
	15 (38.1)	9004704	9004735	9004766	9004797	9004828	9004859	9004890	9004921	9004952	9004983	9005014
	15.5 (39.4)	9004705	9004736	9004767	9004798	9004829	9004860	9004891	9004922	9004953	9004984	9005015
	16 (40.6)	9004706	9004737	9004768	9004799	9004830	9004861	9004892	9004923	9004954	9004985	9005016
	16.5 (41.9)	9004707	9004738	9004769	9004800	9004831	9004862	9004893	9004924	9004955	9004986	9005017
	17 (43.2)	9004708	9004739	9004770	9004801	9004832	9004863	9004894	9004925	9004956	9004987	9005018
	17.5 (44.5)	9004709	9004740	9004771	9004802	9004833	9004864	9004895	9004926	9004957	9004988	9005019
	18 (45.7)	9004710	9004741	9004772	9004803	9004834	9004865	9004896	9004927	9004958	9004989	9005020
	18.5 (47)	9004711	9004742	9004773	9004804	9004835	9004866	9004897	9004928	9004959	9004990	9005021
	19 (48.3)	9004712	9004743	9004774	9004805	9004836	9004867	9004898	9004929	9004960	9004991	9005022
19.5 (49.5)	9004713	9004744	9004775	9004806	9004837	9004868	9004899	9004930	9004961	9004992	9005023	
20 (50.8)	9004714	9004745	9004776	9004807	9004838	9004869	9004900	9004931	9004962	9004993	9005024	
20.5 (52.1)	9004715	9004746	9004777	9004808	9004839	9004870	9004901	9004932	9004963	9004994	9005025	
21 (53.3)	9004716	9004747	9004778	9004809	9004840	9004871	9004902	9004933	9004964	9004995	9005026	

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


9005095B 9005429B
DOSSIER - ALU, 4po, VERROU, FIXE

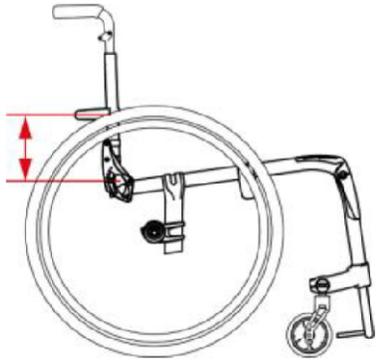

**NOTE: VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE
 À LA CLIENTÈLE POUR DÉTERMINER LA
 HAUTEUR DU RAIDISSEUR DE DOSSIER**

Hauteur standard 5.7po (14.5cm)
 Position la plus basse 4.25po (10.8cm)

**LES ARTICLES DOIVENT ÊTRE USINÉS ET
 ASSEMBLÉS PAR MOTION COMPOSITES**

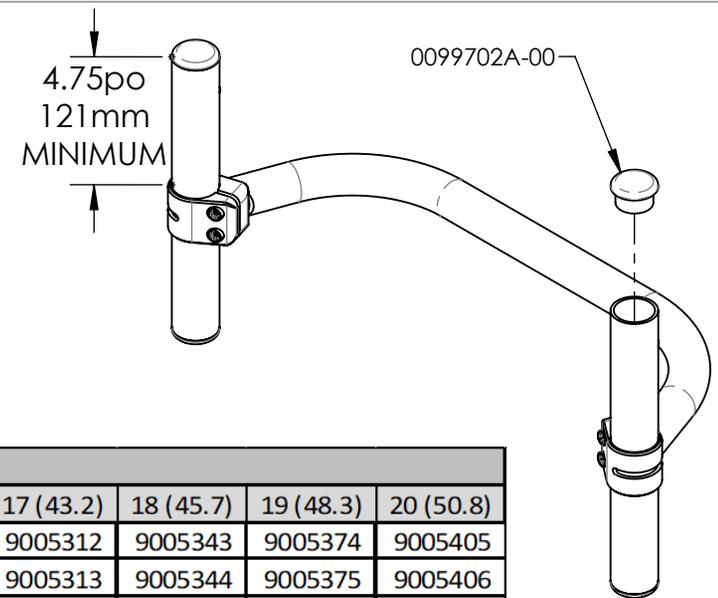

DIMENSIONS DE DOSSIER		LARGEUR en pouces (cm)										
		10 (25.4)	11 (27.9)	12 (30.5)	13 (33.0)	14 (35.6)	15 (38.1)	16 (40.6)	17 (43.2)	18 (45.7)	19 (48.3)	20 (50.8)
HAUTEUR en pouces (cm)	9 (22.9)	9005095	9005126	9005157	9005188	9005219	9005250	9005281	9005312	9005343	9005374	9005405
	9.5 (24.1)	9005096	9005127	9005158	9005189	9005220	9005251	9005282	9005313	9005344	9005375	9005406
	10 (25.4)	9005097	9005128	9005159	9005190	9005221	9005252	9005283	9005314	9005345	9005376	9005407
	10.5 (26.7)	9005098	9005129	9005160	9005191	9005222	9005253	9005284	9005315	9005346	9005377	9005408
	11 (27.9)	9005099	9005130	9005161	9005192	9005223	9005254	9005285	9005316	9005347	9005378	9005409
	11.5 (29.2)	9005100	9005131	9005162	9005193	9005224	9005255	9005286	9005317	9005348	9005379	9005410
	12 (30.5)	9005101	9005132	9005163	9005194	9005225	9005256	9005287	9005318	9005349	9005380	9005411
	12.5 (31.8)	9005102	9005133	9005164	9005195	9005226	9005257	9005288	9005319	9005350	9005381	9005412
	13 (33)	9005103	9005134	9005165	9005196	9005227	9005258	9005289	9005320	9005351	9005382	9005413
	13.5 (34.3)	9005104	9005135	9005166	9005197	9005228	9005259	9005290	9005321	9005352	9005383	9005414
	14 (35.6)	9005105	9005136	9005167	9005198	9005229	9005260	9005291	9005322	9005353	9005384	9005415
	14.5 (36.8)	9005106	9005137	9005168	9005199	9005230	9005261	9005292	9005323	9005354	9005385	9005416
	15 (38.1)	9005107	9005138	9005169	9005200	9005231	9005262	9005293	9005324	9005355	9005386	9005417
	15.5 (39.4)	9005108	9005139	9005170	9005201	9005232	9005263	9005294	9005325	9005356	9005387	9005418
	16 (40.6)	9005109	9005140	9005171	9005202	9005233	9005264	9005295	9005326	9005357	9005388	9005419
	16.5 (41.9)	9005110	9005141	9005172	9005203	9005234	9005265	9005296	9005327	9005358	9005389	9005420
	17 (43.2)	9005111	9005142	9005173	9005204	9005235	9005266	9005297	9005328	9005359	9005390	9005421
	17.5 (44.5)	9005112	9005143	9005174	9005205	9005236	9005267	9005298	9005329	9005360	9005391	9005422
	18 (45.7)	9005113	9005144	9005175	9005206	9005237	9005268	9005299	9005330	9005361	9005392	9005423
	18.5 (47)	9005114	9005145	9005176	9005207	9005238	9005269	9005300	9005331	9005362	9005393	9005424
	19 (48.3)	9005115	9005146	9005177	9005208	9005239	9005270	9005301	9005332	9005363	9005394	9005425
19.5 (49.5)	9005116	9005147	9005178	9005209	9005240	9005271	9005302	9005333	9005364	9005395	9005426	
20 (50.8)	9005117	9005148	9005179	9005210	9005241	9005272	9005303	9005334	9005365	9005396	9005427	
20.5 (52.1)	9005118	9005149	9005180	9005211	9005242	9005273	9005304	9005335	9005366	9005397	9005428	
21 (53.3)	9005119	9005150	9005181	9005212	9005243	9005274	9005305	9005336	9005367	9005398	9005429	




ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9005498B_9005551B
DOSSIER - ALU, 3po, VERROU

NOTE: VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR DÉTERMINER LA HAUTEUR DU RAIDISSEUR DE DOSSIER

Hauteur standard 5.7po (14.5cm)
 Position la plus basse 4.25po (10.8cm)

LES ARTICLES DOIVENT ÊTRE USINÉS ET ASSEMBLÉS PAR MOTION COMPOSITES

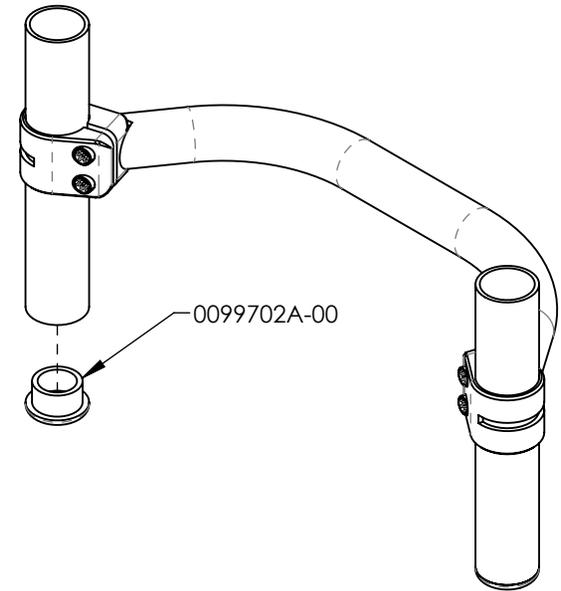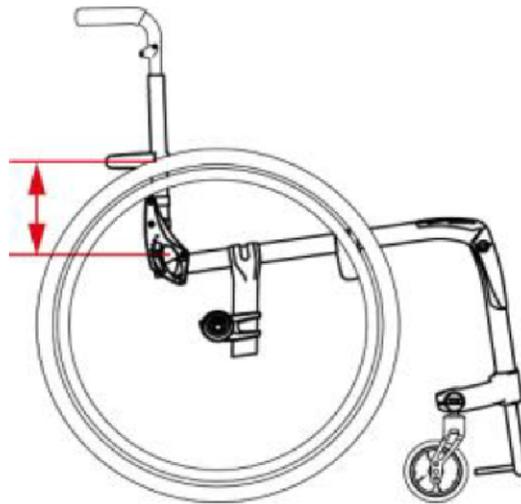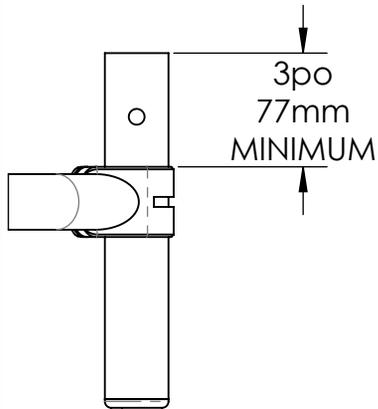

DIMENSIONS DE DOSSIER		LARGEUR en pouce (cm)										
		10 (25.4)	11 (27.9)	12 (30.5)	13 (33.0)	14 (35.6)	15 (38.1)	16 (40.6)	17 (43.2)	18 (45.7)	19 (48.3)	20 (50.8)
HAUTEUR en pouces (cm)	9-12 (22.9-30.5)	9005498	9005503	9005508	9005513	9005518	9005523	9005528	9005533	9005538	9005543	9005548
	12-15 (30.5-38.1)	9005499	9005504	9005509	9005514	9005519	9005524	9005529	9005534	9005539	9005544	9005549
	15-18 (38.1-45.7)	9005500	9005505	9005510	9005515	9005520	9005525	9005530	9005535	9005540	9005545	9005550
	18-21 (45.7-53.3)	9005501	9005506	9005511	9005516	9005521	9005526	9005531	9005536	9005541	9005546	9005551




ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9005628B_9005681B
DOSSIER - ALU, 4po, VERROU

NOTE: VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR DÉTERMINER LA HAUTEUR DU RAIDISSEUR DE DOSSIER

Hauteur standard 5.7po (14.5cm)
 Position la plus basse 4.25po (10.8cm)


LES ARTICLES DOIVENT ÊTRE USINÉS ET ASSEMBLÉS PAR MOTION COMPOSITES

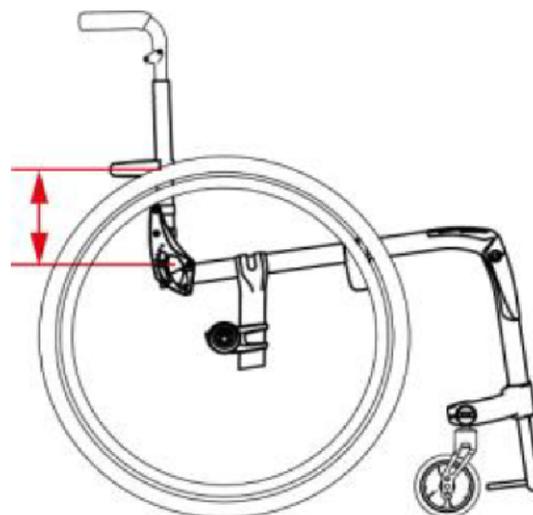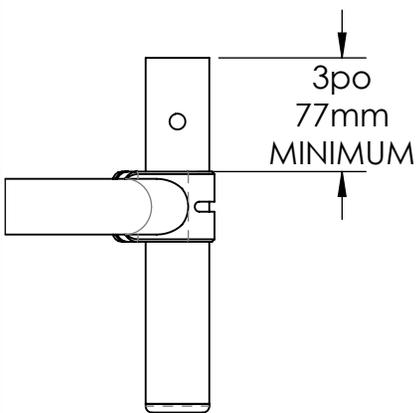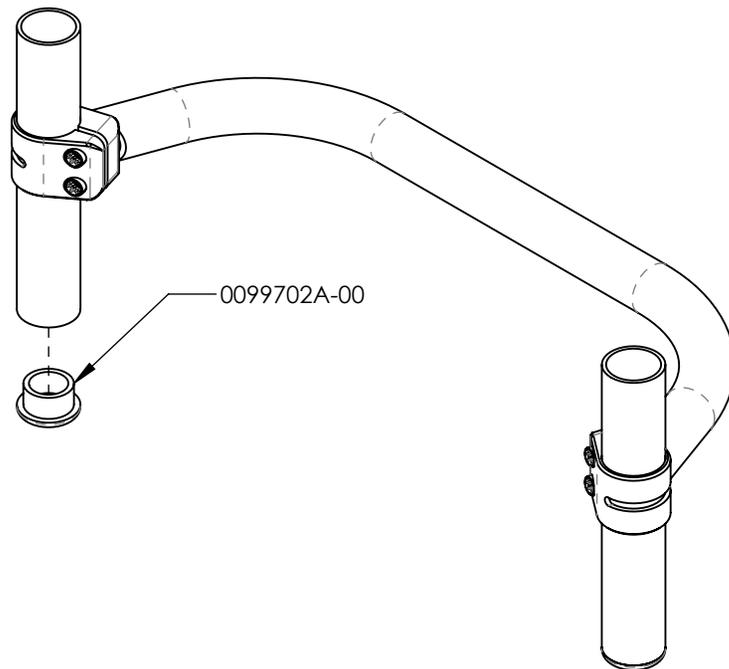

DIMENSIONS DE DOSSIER		LARGEUR en pouces (cm)										
		10 (25.4)	11 (27.9)	12 (30.5)	13 (33.0)	14 (35.6)	15 (38.1)	16 (40.6)	17 (43.2)	18 (45.7)	19 (48.3)	20 (50.8)
HAUTEUR en pouces (cm)	9-12 (22.9-30.5)	9005628	9005633	9005638	9005643	9005648	9005653	9005658	9005663	9005668	9005673	9005678
	12-15 (30.5-38.1)	9005629	9005634	9005639	9005644	9005649	9005654	9005659	9005664	9005669	9005674	9005679
	15-18 (38.1-45.7)	9005630	9005635	9005640	9005645	9005650	9005655	9005660	9005665	9005670	9005675	9005680
	18-21 (45.7-53.3)	9005631	9005636	9005641	9005646	9005651	9005656	9005661	9005666	9005671	9005676	9005681

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


9006564B 9006895B
DOSSIER - ALU, 3PO, ULTRA, FIXE

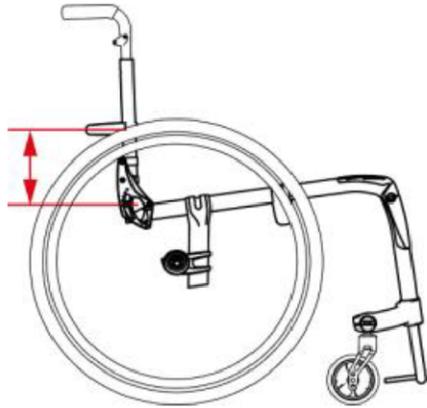

NOTE: VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR DÉTERMINER LA HAUTEUR DU RAIDISSEUR DE DOSSIER

Hauteur standard 5.7po (14.5cm)
 Position la plus basse 4.25po (10.8cm)


LES ARTICLES DOIVENT ÊTRE USINÉS ET ASSEMBLÉS PAR MOTION COMPOSITES

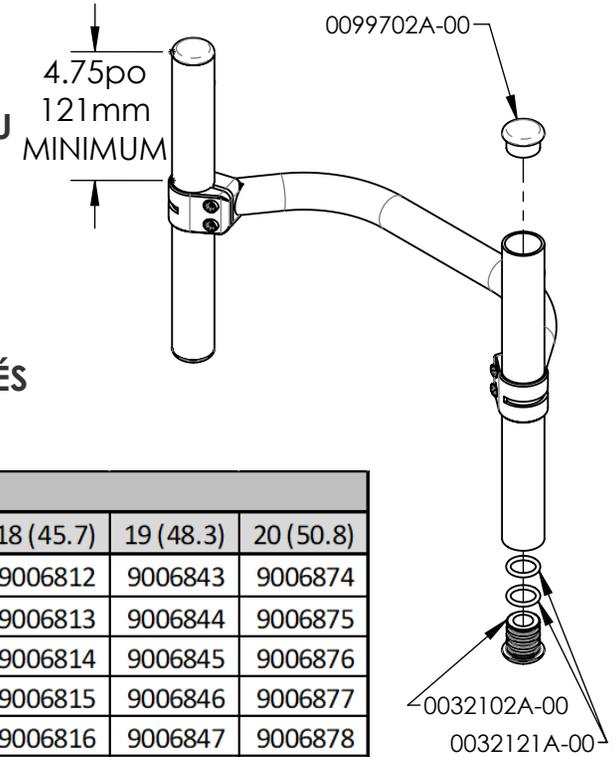

DIMENSIONS DE DOSSIER		LARGEUR en pouces (cm)										
		10 (25.4)	11 (27.9)	12 (30.5)	13 (33.0)	14 (35.6)	15 (38.1)	16 (40.6)	17 (43.2)	18 (45.7)	19 (48.3)	20 (50.8)
HAUTEUR en pouces (cm)	9 (22.9)	9006564	9006595	9006626	9006657	9006688	9006719	9006750	9006781	9006812	9006843	9006874
	9.5 (24.1)	9006565	9006596	9006627	9006658	9006689	9006720	9006751	9006782	9006813	9006844	9006875
	10 (25.4)	9006566	9006597	9006628	9006659	9006690	9006721	9006752	9006783	9006814	9006845	9006876
	10.5 (26.7)	9006567	9006598	9006629	9006660	9006691	9006722	9006753	9006784	9006815	9006846	9006877
	11 (27.9)	9006568	9006599	9006630	9006661	9006692	9006723	9006754	9006785	9006816	9006847	9006878
	11.5 (29.2)	9006569	9006600	9006631	9006662	9006693	9006724	9006755	9006786	9006817	9006848	9006879
	12 (30.5)	9006570	9006601	9006632	9006663	9006694	9006725	9006756	9006787	9006818	9006849	9006880
	12.5 (31.8)	9006571	9006602	9006633	9006664	9006695	9006726	9006757	9006788	9006819	9006850	9006881
	13 (33)	9006572	9006603	9006634	9006665	9006696	9006727	9006758	9006789	9006820	9006851	9006882
	13.5 (34.3)	9006573	9006604	9006635	9006666	9006697	9006728	9006759	9006790	9006821	9006852	9006883
	14 (35.6)	9006574	9006605	9006636	9006667	9006698	9006729	9006760	9006791	9006822	9006853	9006884
	14.5 (36.8)	9006575	9006606	9006637	9006668	9006699	9006730	9006761	9006792	9006823	9006854	9006885
	15 (38.1)	9006576	9006607	9006638	9006669	9006700	9006731	9006762	9006793	9006824	9006855	9006886
	15.5 (39.4)	9006577	9006608	9006639	9006670	9006701	9006732	9006763	9006794	9006825	9006856	9006887
	16 (40.6)	9006578	9006609	9006640	9006671	9006702	9006733	9006764	9006795	9006826	9006857	9006888
	16.5 (41.9)	9006579	9006610	9006641	9006672	9006703	9006734	9006765	9006796	9006827	9006858	9006889
	17 (43.2)	9006580	9006611	9006642	9006673	9006704	9006735	9006766	9006797	9006828	9006859	9006890
	17.5 (44.5)	9006581	9006612	9006643	9006674	9006705	9006736	9006767	9006798	9006829	9006860	9006891
18 (45.7)	9006582	9006613	9006644	9006675	9006706	9006737	9006768	9006799	9006830	9006861	9006892	
18.5 (47)	9006583	9006614	9006645	9006676	9006707	9006738	9006769	9006800	9006831	9006862	9006893	
19 (48.3)	9006584	9006615	9006646	9006677	9006708	9006739	9006770	9006801	9006832	9006863	9006894	
19.5 (49.5)	9006585	9006616	9006647	9006678	9006709	9006740	9006771	9006802	9006833	9006864	9006895	

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


9006967B_9007298B
DOSSIER - ALU, 4po, ULTRA, FIXE

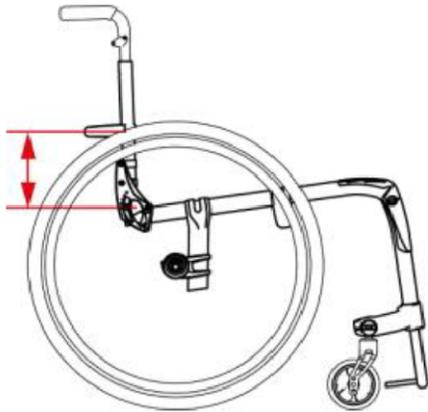

NOTE: VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR DÉTERMINER LA HAUTEUR DU RAIDISSEUR DE DOSSIER

Hauteur standard 5.7po (14.5cm)
 Position la plus basse 4.25po (10.8cm)

LES ARTICLES DOIVENT ÊTRE USINÉS ET ASSEMBLÉS PAR MOTION COMPOSITES

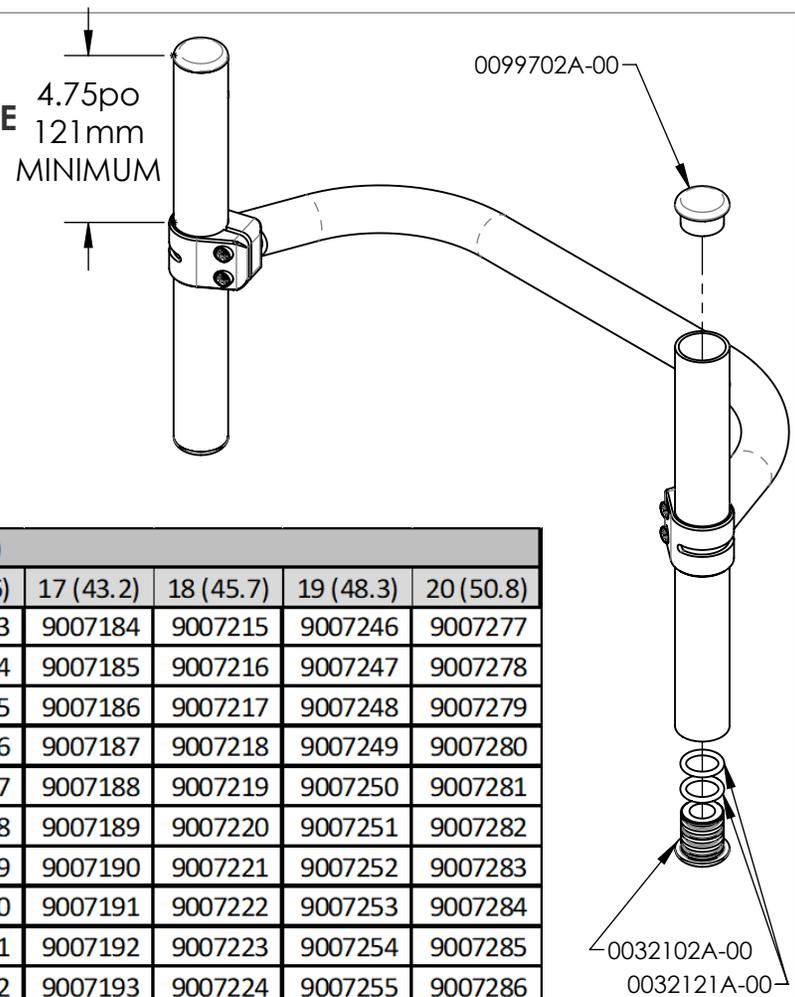

DIMENSIONS DE DOSSIER		LARGEUR en pouces (cm)										
		10 (25.4)	11 (27.9)	12 (30.5)	13 (33.0)	14 (35.6)	15 (38.1)	16 (40.6)	17 (43.2)	18 (45.7)	19 (48.3)	20 (50.8)
HAUTEUR en pouces (cm)	9 (22.9)	9006967	9006998	9007029	9007060	9007091	9007122	9007153	9007184	9007215	9007246	9007277
	9.5 (24.1)	9006968	9006999	9007030	9007061	9007092	9007123	9007154	9007185	9007216	9007247	9007278
	10 (25.4)	9006969	9007000	9007031	9007062	9007093	9007124	9007155	9007186	9007217	9007248	9007279
	10.5 (26.7)	9006970	9007001	9007032	9007063	9007094	9007125	9007156	9007187	9007218	9007249	9007280
	11 (27.9)	9006971	9007002	9007033	9007064	9007095	9007126	9007157	9007188	9007219	9007250	9007281
	11.5 (29.2)	9006972	9007003	9007034	9007065	9007096	9007127	9007158	9007189	9007220	9007251	9007282
	12 (30.5)	9006973	9007004	9007035	9007066	9007097	9007128	9007159	9007190	9007221	9007252	9007283
	12.5 (31.8)	9006974	9007005	9007036	9007067	9007098	9007129	9007160	9007191	9007222	9007253	9007284
	13 (33)	9006975	9007006	9007037	9007068	9007099	9007130	9007161	9007192	9007223	9007254	9007285
	13.5 (34.3)	9006976	9007007	9007038	9007069	9007100	9007131	9007162	9007193	9007224	9007255	9007286
	14 (35.6)	9006977	9007008	9007039	9007070	9007101	9007132	9007163	9007194	9007225	9007256	9007287
	14.5 (36.8)	9006978	9007009	9007040	9007071	9007102	9007133	9007164	9007195	9007226	9007257	9007288
	15 (38.1)	9006979	9007010	9007041	9007072	9007103	9007134	9007165	9007196	9007227	9007258	9007289
	15.5 (39.4)	9006980	9007011	9007042	9007073	9007104	9007135	9007166	9007197	9007228	9007259	9007290
	16 (40.6)	9006981	9007012	9007043	9007074	9007105	9007136	9007167	9007198	9007229	9007260	9007291
	16.5 (41.9)	9006982	9007013	9007044	9007075	9007106	9007137	9007168	9007199	9007230	9007261	9007292
	17 (43.2)	9006983	9007014	9007045	9007076	9007107	9007138	9007169	9007200	9007231	9007262	9007293
	17.5 (44.5)	9006984	9007015	9007046	9007077	9007108	9007139	9007170	9007201	9007232	9007263	9007294
	18 (45.7)	9006985	9007016	9007047	9007078	9007109	9007140	9007171	9007202	9007233	9007264	9007295
18.5 (47)	9006986	9007017	9007048	9007079	9007110	9007141	9007172	9007203	9007234	9007265	9007296	
19 (48.3)	9006987	9007018	9007049	9007080	9007111	9007142	9007173	9007204	9007235	9007266	9007297	
19.5 (49.5)	9006988	9007019	9007050	9007081	9007112	9007143	9007174	9007205	9007236	9007267	9007298	




ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9007370B_9007423B
DOSSIER - ALU, 3po, ULTRA

NOTE: VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR DÉTERMINER LA HAUTEUR DU RAIDISSEUR DE DOSSIER

Hauteur standard 5.7po (14.5cm)
 Position la plus basse 4.25po (10.8cm)

LES ARTICLES DOIVENT ÊTRE USINÉS ET ASSEMBLÉS PAR MOTION COMPOSITES

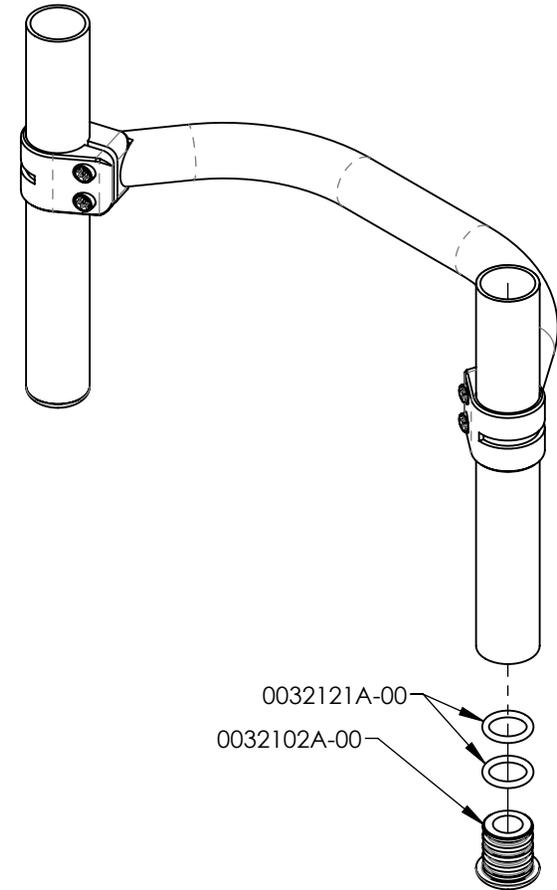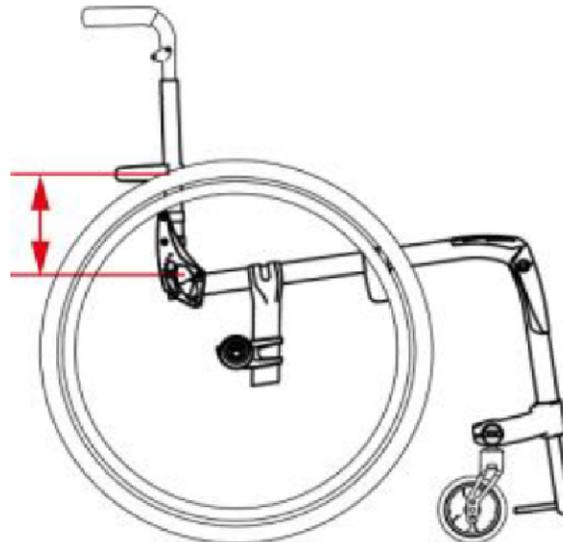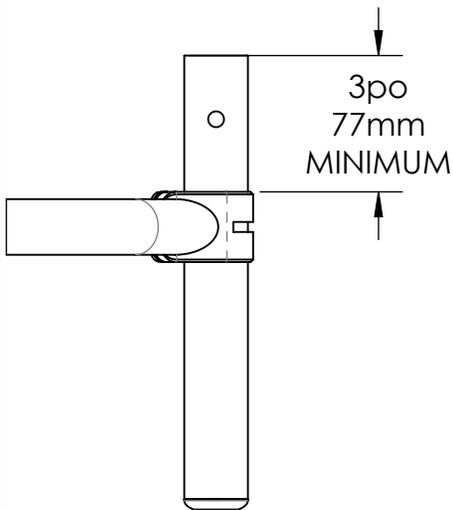

DIMENSIONS DE DOSSIER		LARGEUR en pouces (cm)										
		10 (25.4)	11 (27.9)	12 (30.5)	13 (33.0)	14 (35.6)	15 (38.1)	16 (40.6)	17 (43.2)	18 (45.7)	19 (48.3)	20 (50.8)
HAUTEUR en pouces (cm)	9-12 (22.9-30.5)	9007370	9007375	9007380	9007385	9007390	9007395	9007400	9007405	9007410	9007415	9007420
	12-15 (30.5-38.1)	9007371	9007376	9007381	9007386	9007391	9007396	9007401	9007406	9007411	9007416	9007421
	15-18 (38.1-45.7)	9007372	9007377	9007382	9007387	9007392	9007397	9007402	9007407	9007412	9007417	9007422
	18-21 (45.7-53.3)	9007373	9007378	9007383	9007388	9007393	9007398	9007403	9007408	9007413	9007418	9007423




ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9007500B_9007553B
DOSSIER - ALU, 4po, ULTRA

NOTE: VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR DÉTERMINER LA HAUTEUR DU RAIDISSEUR DE DOSSIER

Hauteur standard 5.7po (14.5cm)
 Position la plus basse 4.25po (10.8cm)

LES ARTICLES DOIVENT ÊTRE USINÉS ET ASSEMBLÉS PAR MOTION COMPOSITES

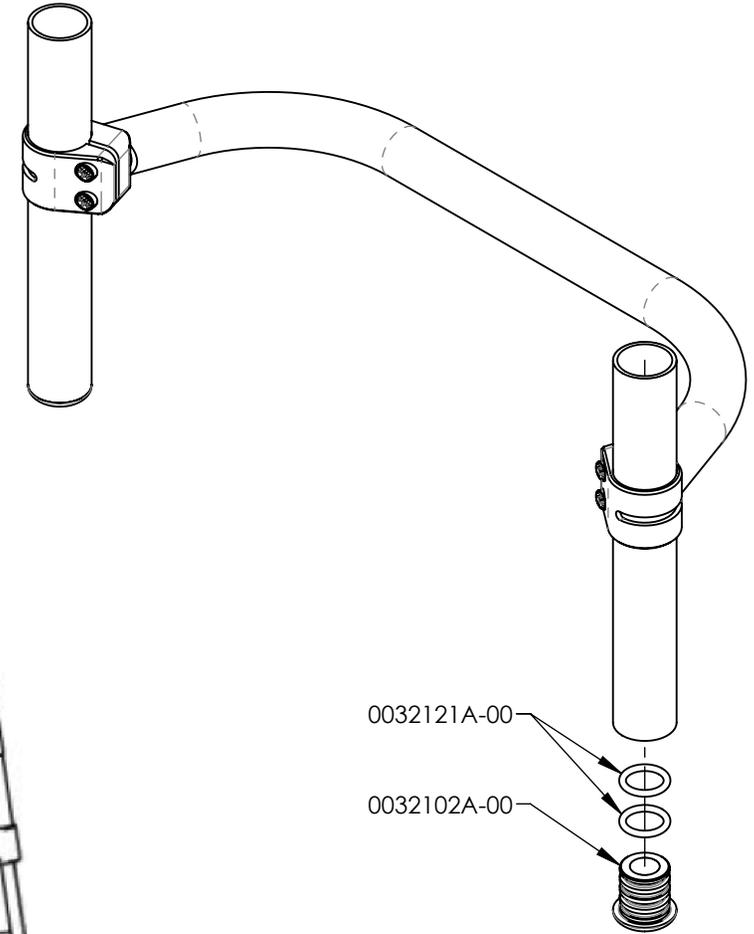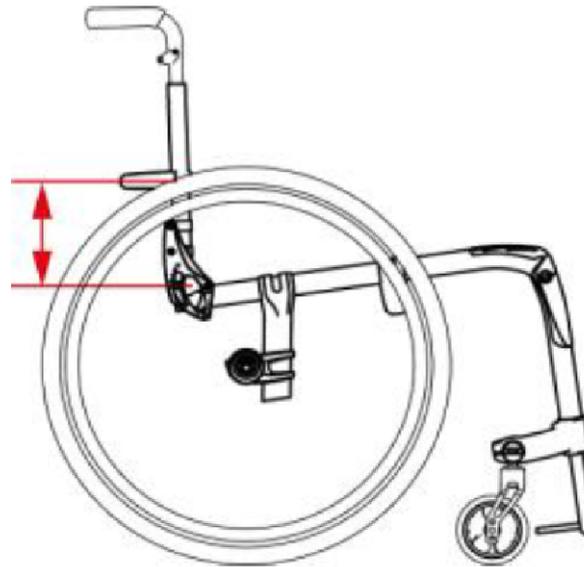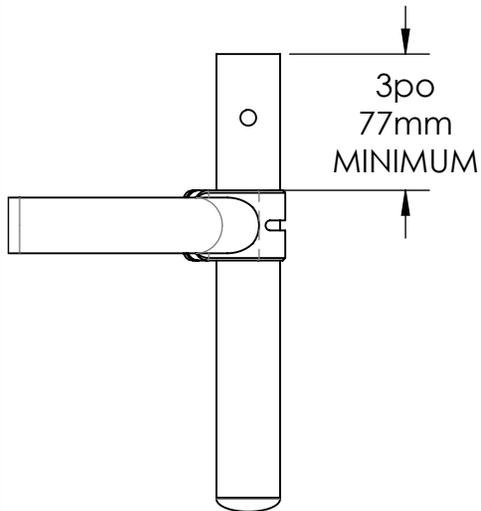


DIMENSIONS DE DOSSIER		LARGEUR en pouces (cm)										
		10 (25.4)	11 (27.9)	12 (30.5)	13 (33.0)	14 (35.6)	15 (38.1)	16 (40.6)	17 (43.2)	18 (45.7)	19 (48.3)	20 (50.8)
HAUTEUR en pouces (cm)	9-12 (22.9-30.5)	9007500	9007505	9007510	9007515	9007520	9007525	9007530	9007535	9007540	9007545	9007550
	12-15 (30.5-38.1)	9007501	9007506	9007511	9007516	9007521	9007526	9007531	9007536	9007541	9007546	9007551
	15-18 (38.1-45.7)	9007502	9007507	9007512	9007517	9007522	9007527	9007532	9007537	9007542	9007547	9007552
	18-21 (45.7-53.3)	9007503	9007508	9007513	9007518	9007523	9007528	9007533	9007538	9007543	9007548	9007553

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


Catalogue de montants de dossier
Assemblage canne de dossier alu rabattable avec verrouillage

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
* 1	9004692 A 9005026	DOSSIER - ALU, 3PO, VERROU, FIXE	1
* 2	9005095 A 9005429	DOSSIER - ALU, 4PO, VERROU, FIXE	1
* 3	9005498 A 9005551	DOSSIER - ALU, 3PO, VERROU	1
* 4	9005628 A 9005681	DOSSIER - ALUMINIUM, 4PO PROFOND, RABATABLE AVEC VERROUILLAGE	1

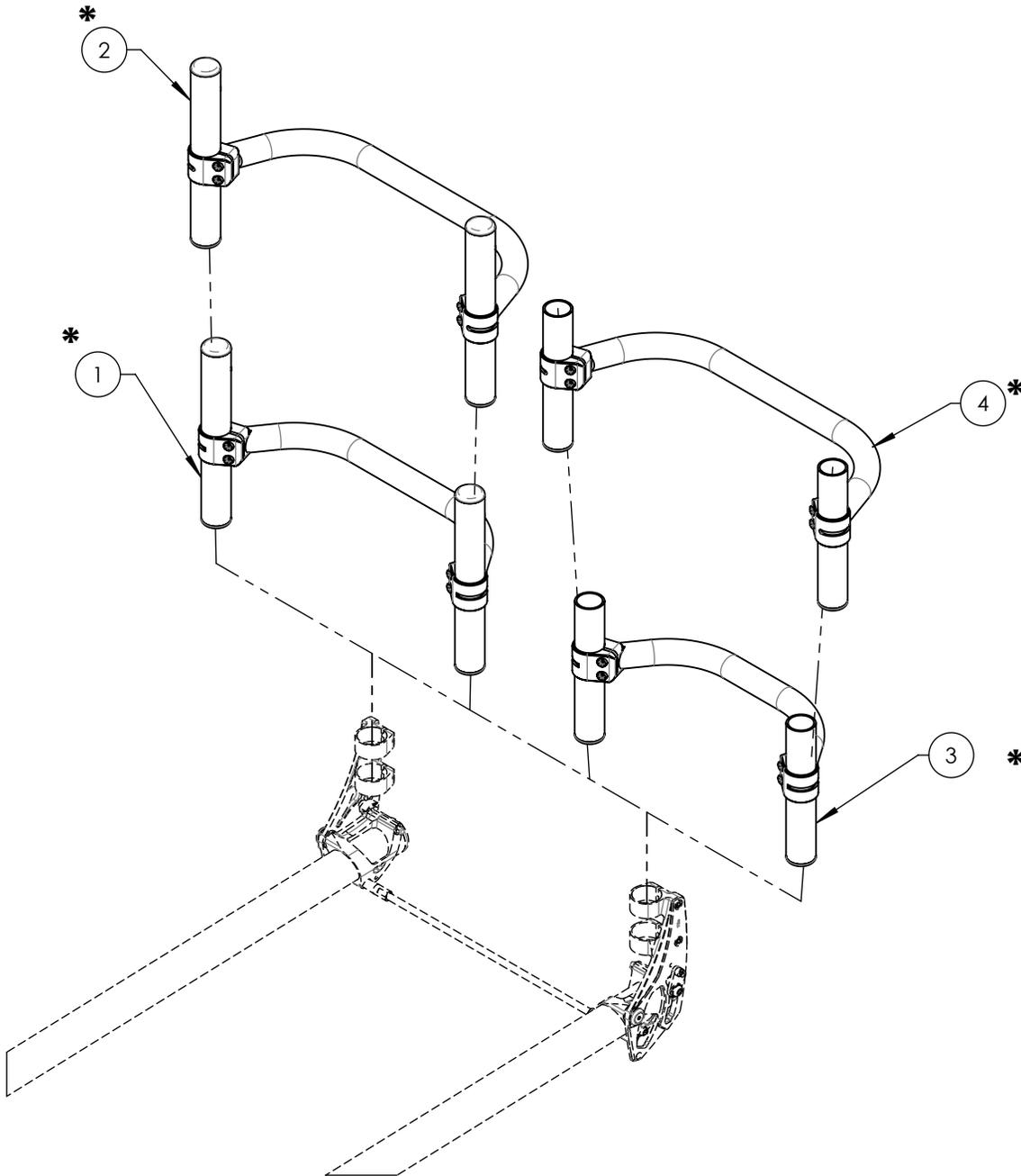

*** NOTE: VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA PAGE DÉTAILLÉE DES DOSSIERS POUR LES GRANDEURS ET HAUTEURS DISPONIBLES**


Catalogue de montants de dossier
Assemblage canne de dossier alu ultraléger

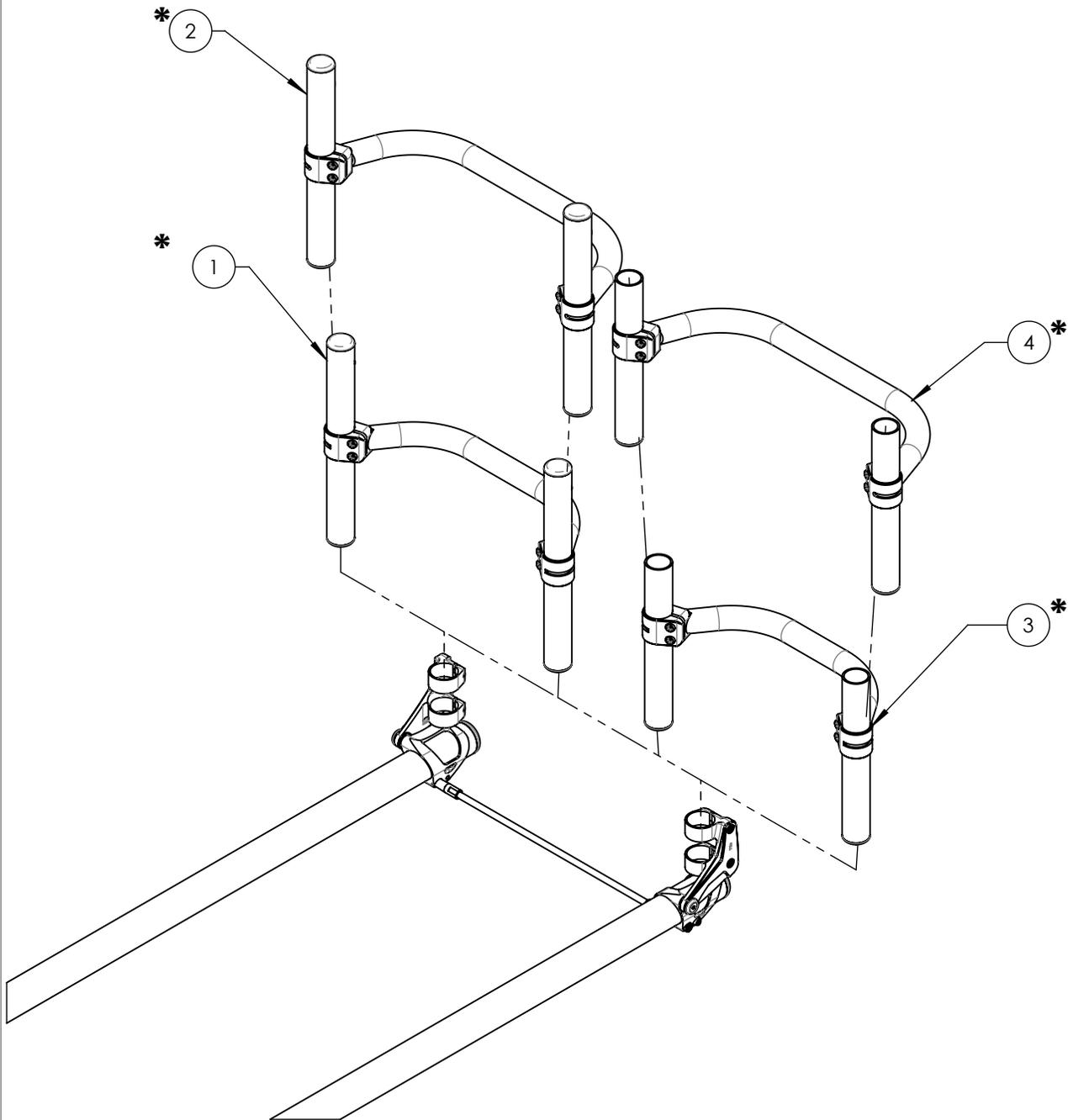


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
* 1	9006564 A 9006895	DOSSIER - ALU, 3PO, ULTRA, FIXE	1
* 2	9006967 A 9007298	DOSSIER - ALU, 4PO, ULTRA, FIXE	1
* 3	9007370 A 9007423	DOSSIER - ALU, 3PO, ULTRA	1
* 4	9007520 A 9007553	DOSSIER - ALUMINIUM, 4PO PROFOND, ULTRALÉGER	1

*** NOTE: VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA PAGE DÉTAILLÉE DES DOSSIERS POUR LES GRANDEURS ET HAUTEURS DISPONIBLES**

Catalogue de montants de dossier
Mécanisme de dossier rabattable standard

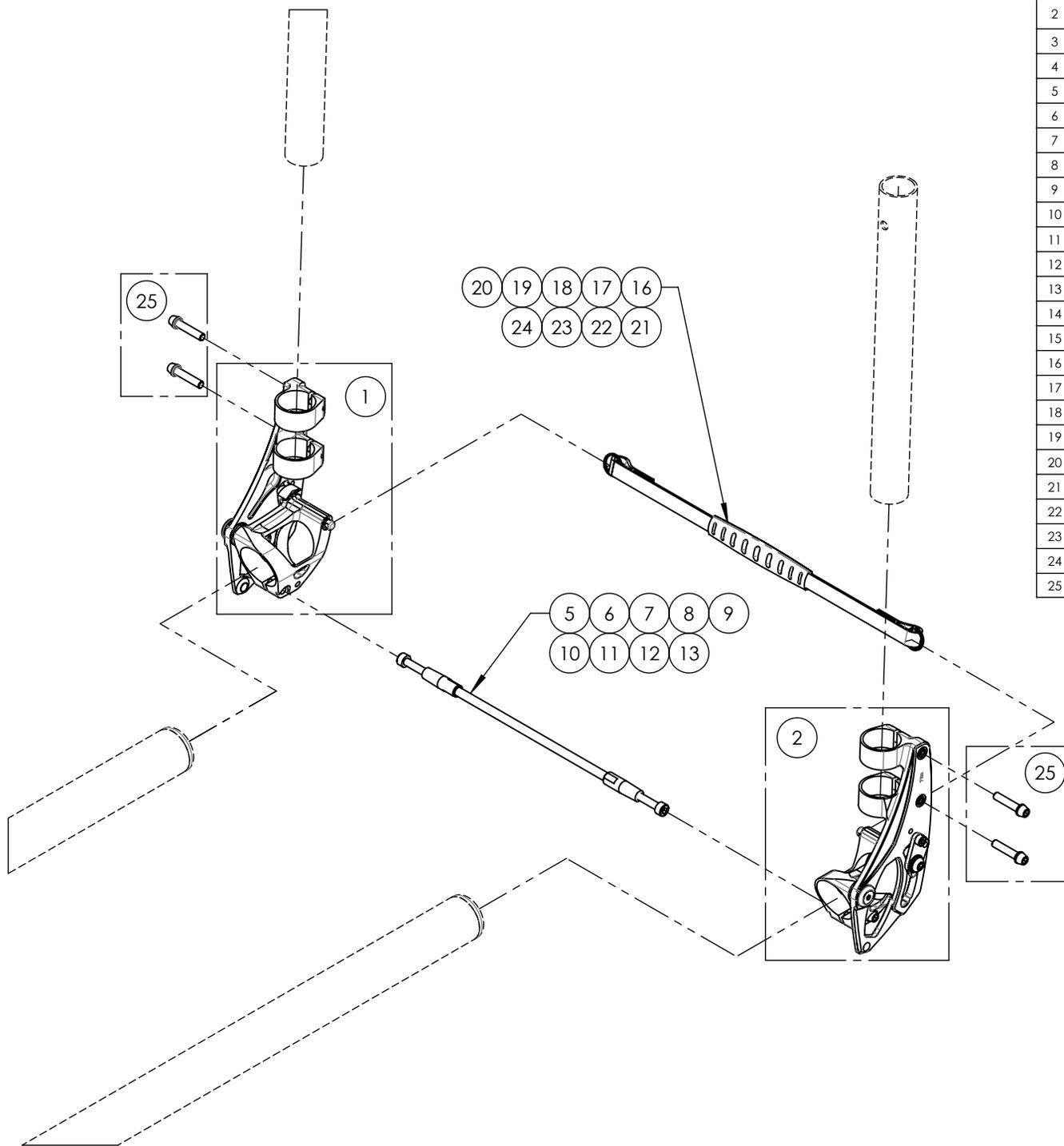



No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	9003127A-00	DOSSIER - RABATTABLE AVEC VERROUILLAGE, DROITE, AJUSTABLE EN ANGLE & PROFONDEUR	1
2	9003128A-00	DOSSIER - RABATTABLE AVEC VERROUILLAGE, GAUCHE, AJUSTABLE EN ANGLE & PROFONDEUR	1
3	9003131A-00	RAIDISSEUR SIÈGE ARRIÈRE - CARBONE, 10PO LARGEUR	1
4	9003132A-00	RAIDISSEUR SIÈGE ARRIÈRE - CARBONE, 11PO LARGEUR	1
5	9003133A-00	RAIDISSEUR SIÈGE ARRIÈRE - CARBONE, 12PO LARGEUR	1
6	9003134A-00	RAIDISSEUR SIÈGE ARRIÈRE - CARBONE, 13PO LARGEUR	1
7	9003135A-00	RAIDISSEUR SIÈGE ARRIÈRE - CARBONE, 14PO LARGEUR	1
8	9003136A-00	RAIDISSEUR SIÈGE ARRIÈRE - CARBONE, 15PO LARGEUR	1
9	9003137A-00	RAIDISSEUR SIÈGE ARRIÈRE - CARBONE, 16PO LARGEUR	1
10	9003138A-00	RAIDISSEUR SIÈGE ARRIÈRE - CARBONE, 17PO LARGEUR	1
11	9003139A-00	RAIDISSEUR SIÈGE ARRIÈRE - CARBONE, 18PO LARGEUR	1
12	9003140A-00	RAIDISSEUR SIÈGE ARRIÈRE - CARBONE, 19PO LARGEUR	1
13	9003141A-00	RAIDISSEUR SIÈGE ARRIÈRE - CARBONE, 20PO LARGEUR	1
14	9003255A-00	DOSSIER - CORDON À DÉCLENCHEMENT RAPIDE, 10PO	1
15	9003256A-00	DOSSIER - CORDON À DÉCLENCHEMENT RAPIDE, 11PO	1
16	9003257A-00	DOSSIER - CORDON À DÉCLENCHEMENT RAPIDE, 12PO	1
17	9003258A-00	DOSSIER - CORDON À DÉCLENCHEMENT RAPIDE, 13PO	1
18	9003259A-00	DOSSIER - CORDON À DÉCLENCHEMENT RAPIDE, 14PO	1
19	9003260A-00	DOSSIER - CORDON À DÉCLENCHEMENT RAPIDE, 15PO	1
20	9003261A-00	DOSSIER - CORDON À DÉCLENCHEMENT RAPIDE, 16PO	1
21	9003262A-00	DOSSIER - CORDON À DÉCLENCHEMENT RAPIDE, 17PO	1
22	9003263A-00	DOSSIER - CORDON À DÉCLENCHEMENT RAPIDE, 18PO	1
23	9003264A-00	DOSSIER - CORDON À DÉCLENCHEMENT RAPIDE, 19PO	1
24	9003265A-00	DOSSIER - CORDON À DÉCLENCHEMENT RAPIDE, 20PO	1
25	9010391A-00	QUINCAILLERIE - DOSSIER À VERROU, STD	2

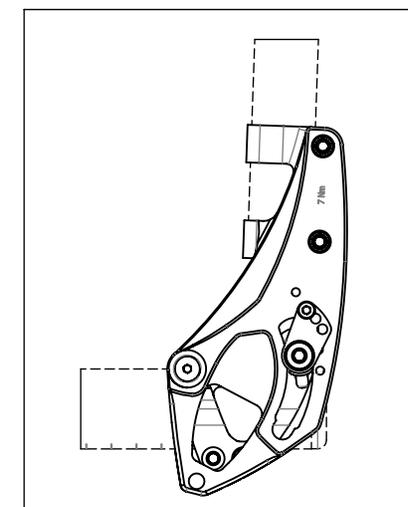

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

Catalogue de montats de dossier
Mécanisme de dossier rabattable ultraléger


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	9003129A-00	DOSSIER - ULTRALÉGER, RABATTABLE SANS VERROUILLAGE, DROITE, AJUSTABLE EN PROFONDEUR	1
2	9003130A-00	DOSSIER - ULTRALÉGER, RABATTABLE SANS VERROUILLAGE, GAUCHE, AJUSTABLE EN PROFONDEUR	1
3	9003133A-00	RAIDISSEUR SIÈGE ARRIÈRE - CARBONE, 12PO LARGEUR	1
4	9003134A-00	RAIDISSEUR SIÈGE ARRIÈRE - CARBONE, 13PO LARGEUR	1
5	9003135A-00	RAIDISSEUR SIÈGE ARRIÈRE - CARBONE, 14PO LARGEUR	1
6	9003136A-00	RAIDISSEUR SIÈGE ARRIÈRE - CARBONE, 15PO LARGEUR	1
7	9003137A-00	RAIDISSEUR SIÈGE ARRIÈRE - CARBONE, 16PO LARGEUR	1
8	9003138A-00	RAIDISSEUR SIÈGE ARRIÈRE - CARBONE, 17PO LARGEUR	1
9	9003139A-00	RAIDISSEUR SIÈGE ARRIÈRE - CARBONE, 18PO LARGEUR	1
10	9003140A-00	RAIDISSEUR SIÈGE ARRIÈRE - CARBONE, 19PO LARGEUR	1
11	9003141A-00	RAIDISSEUR SIÈGE ARRIÈRE - CARBONE, 20PO LARGEUR	1

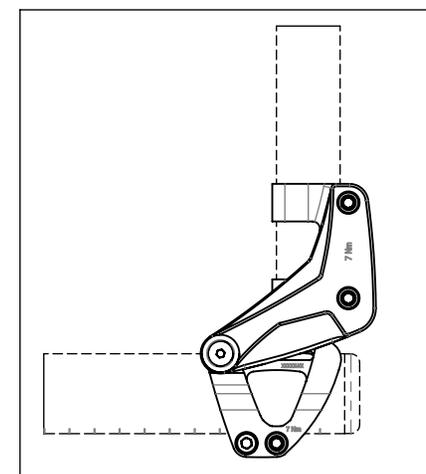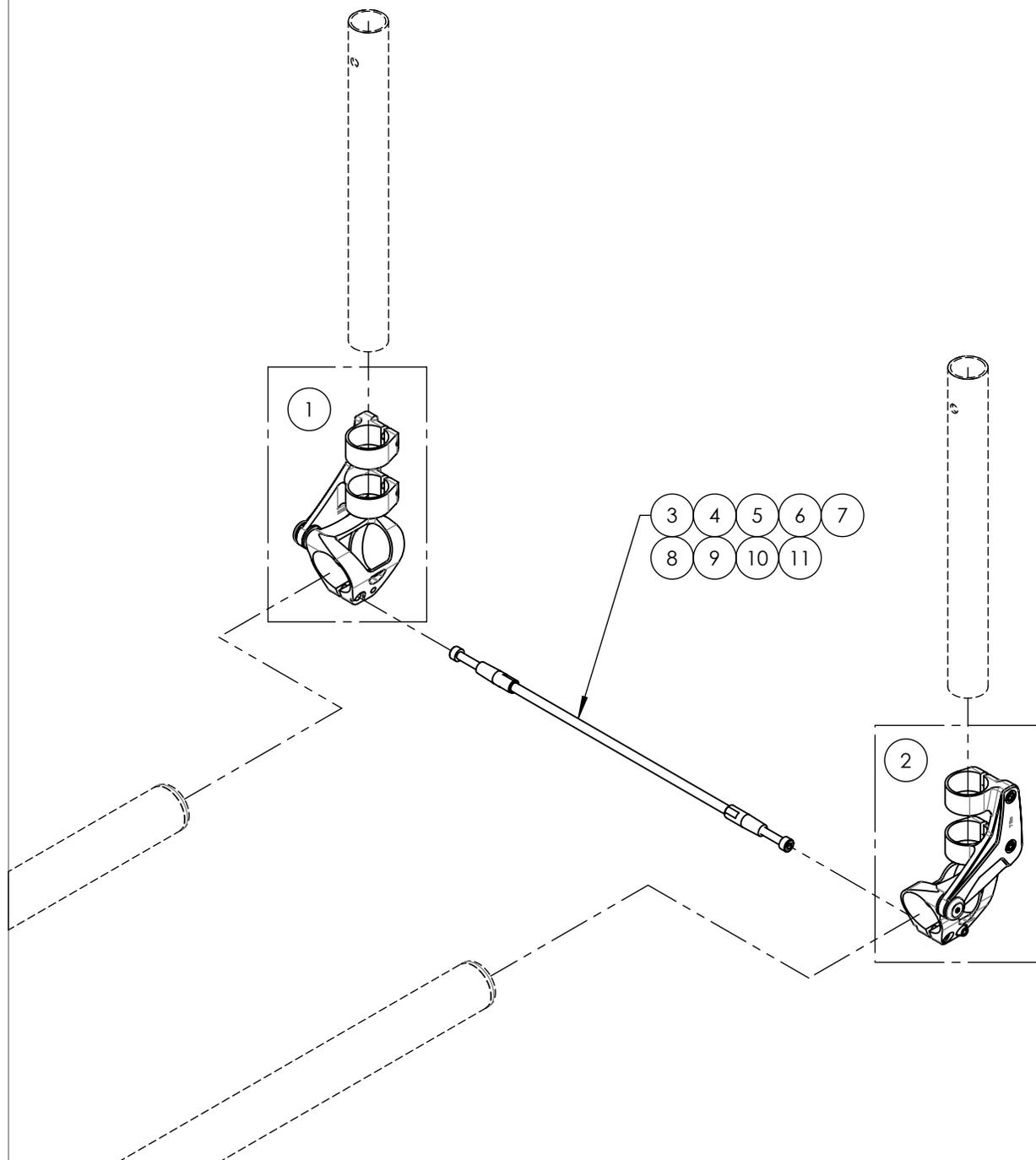

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

Catalogue de montants de dossier
Poignées de poussée ajustable en hauteur à attache rapide

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	9003300A-00	POIGNÉE DE POUSSÉE - AJUST EN HAUTEUR, 9-20po	1
2	9003301A-00	POIGNÉE DE POUSSÉE - AJUST EN HAUTEUR, 9-23po	1

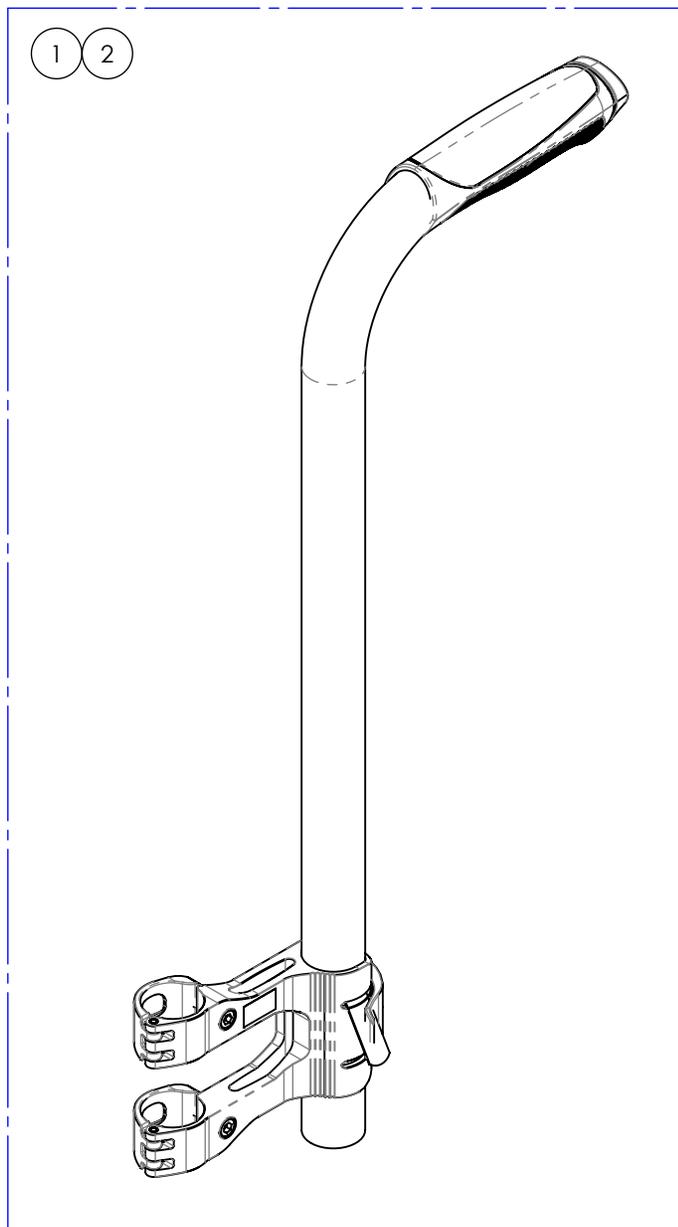

**POUR FAUTEUIL AVEC POIDS MAXIMUM
265 lbs (120 kg)**

LISTE D'INCOMPATIBILITÉS (TOUS LES FAUTEUILS):

- DOSSIERS AJUSTABLE EN PROFONDEUR
(#9001278A À #9001284A)
- POIGNÉES DE POUSSÉE
(#9001285A, #9002915A & #9003095A)




POUR FAUTEUILS APEX SEULEMENT:

- INCOMPATIBLE AVEC TOUS LES DOSSIERS 9-12po
- PLAGE D'AJUSTEMENT EN HAUTEUR LIMITÉE AVEC L'OPTION +3po DE DOSSIER RÉGLABLE EN PROFONDEUR OU AVEC L'OPTION DE L'ANCRAGE WC-19
- INCOMPATIBLE AVEC LES NUMÉROS DE SÉRIE AVANT #53830 SINON LA HAUTEUR DU RAIDISSEUR DE DOSSIER DOIT ÊTRE RÉAJUSTÉ PAR MOTION COMPOSITES

(SVP CONTACTER NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR LES INFOS)

Catalogue de montants de dossier
Poignées de poussée & extension droite


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	9001286A-00	EXTENSION DROITE AJUST	1
2	9001285A-00	POIGNÉE DE POUSSÉE - STD	1
3	9002915A-00	POIGNÉE DE POUSSÉE - HD	1
4	9003095A-00	POIGNÉE DE POUSSÉE - RABATTABLE	1

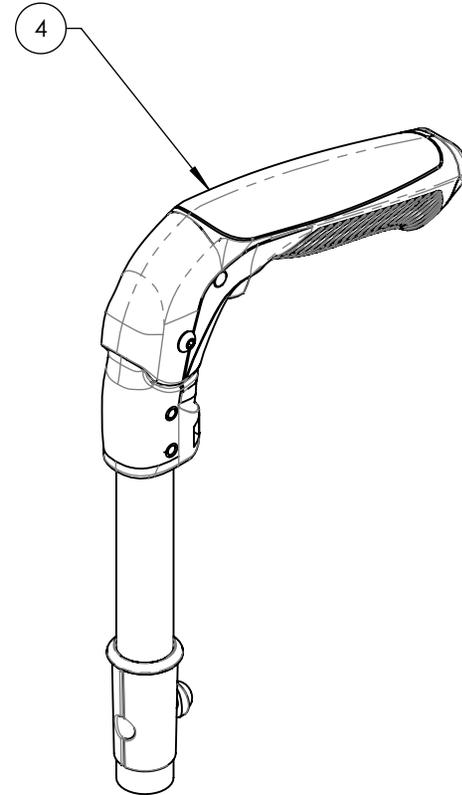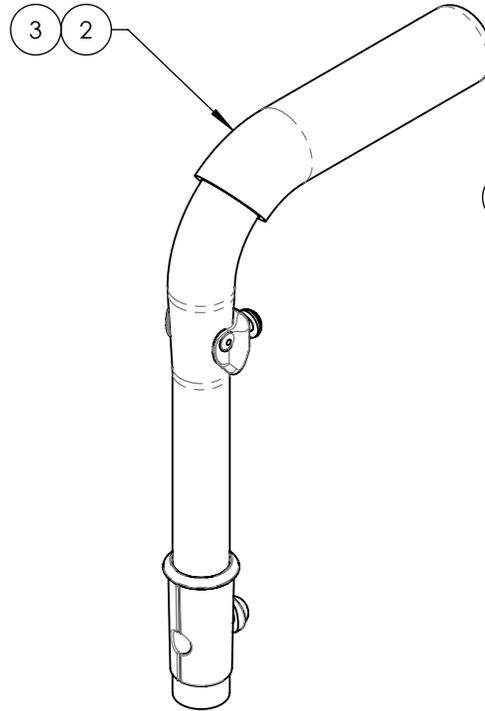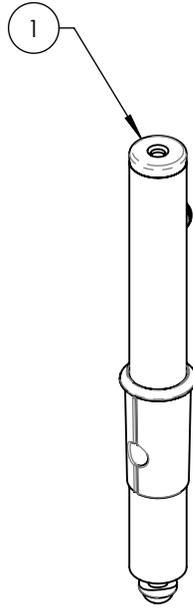


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

Catalogue de montants de dossier
Barre de tension de dossier pliante Newton

UTILISER LE MANCHON #0032001A-00 SI LA BARRE DE TENSION NEWTON (#0060704C À #0060714C) SERA INSTALLÉE AVEC LES MONTANTS DE DOSSIER ALUMINIUM DROIT AVEC POIGNÉE INTÉGRÉE (#9003298A OU #9003299A)

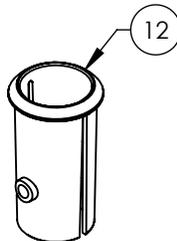

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0060704C-00	BARRE DE TENSION PLIABLE NEWTON 12po - ASSY	1
2	0060705C-00	BARRE DE TENSION PLIABLE NEWTON 13po - ASSY	1
3	0060706C-00	BARRE DE TENSION PLIABLE NEWTON 14po - ASSY	1
4	0060707C-00	BARRE DE TENSION PLIABLE NEWTON 15po - ASSY	1
5	0060708C-00	BARRE DE TENSION PLIABLE NEWTON 16po - ASSY	1
6	0060709C-00	BARRE DE TENSION PLIABLE NEWTON 17po - ASSY	1
7	0060710C-00	BARRE DE TENSION PLIABLE NEWTON 18po - ASSY	1
8	0060711C-00	BARRE DE TENSION PLIABLE NEWTON 19po - ASSY	1
9	0060712C-00	BARRE DE TENSION PLIABLE NEWTON 20po - ASSY	1
10	0060713C-00	BARRE DE TENSION PLIABLE NEWTON 21po - ASSY	1
11	0060714C-00	BARRE DE TENSION PLIABLE NEWTON 22po - ASSY	1
12	0032001A-00	MANCHON POIGNÉE DE POUSSETTE	1

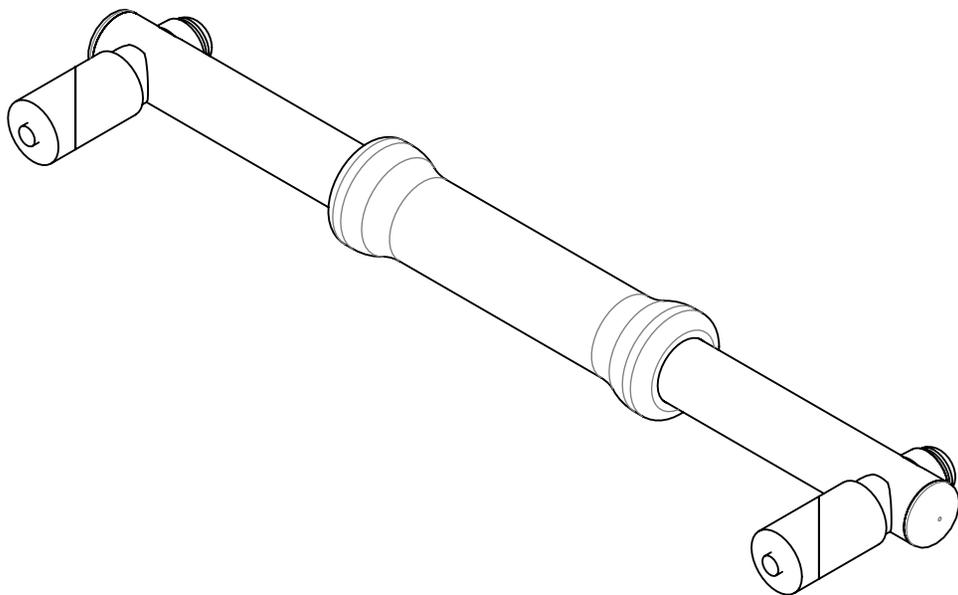

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


AVERTISSEMENT important sur les poignées de poussette






Les poignées de poussette n'ont pas été conçues pour soulever ou tirer le poids d'un utilisateur dans son fauteuil roulant. Cet accessoire est conçu pour pousser et guider l'utilisateur dans son fauteuil.

Soulever ou tirer le poids d'un utilisateur dans son fauteuil roulant peut résulter à un bris des poignées de poussée et causer des blessures graves **(SVP VOUS RÉFÉRER AU MANUEL D'UTILISATEUR)**


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0051523A-00	POIGNÉE POUSETTE 10po - ASSY	1
2	0051524A-00	POIGNÉE POUSETTE 11po - ASSY	1
3	0051525A-00	POIGNÉE POUSETTE 12po - ASSY	1
4	0051526A-00	POIGNÉE POUSETTE 13po - ASSY	1
5	0051527A-00	POIGNÉE POUSETTE 14po - ASSY	1
6	0051528A-00	POIGNÉE POUSETTE 15po - ASSY	1
7	0051529A-00	POIGNÉE POUSETTE 16po - ASSY	1
8	0051530A-00	POIGNÉE POUSETTE 17po - ASSY	1
9	0051531A-00	POIGNÉE POUSETTE 18po - ASSY	1
10	0051532A-00	POIGNÉE POUSETTE 19po - ASSY	1
11	0051533A-00	POIGNÉE POUSETTE 20po - ASSY	1
12	0032001A-00	MANCHON POIGNÉE DE POUSETTE	1
13	9002915A-00	POIGNÉE DE POUSSÉE - HD	2

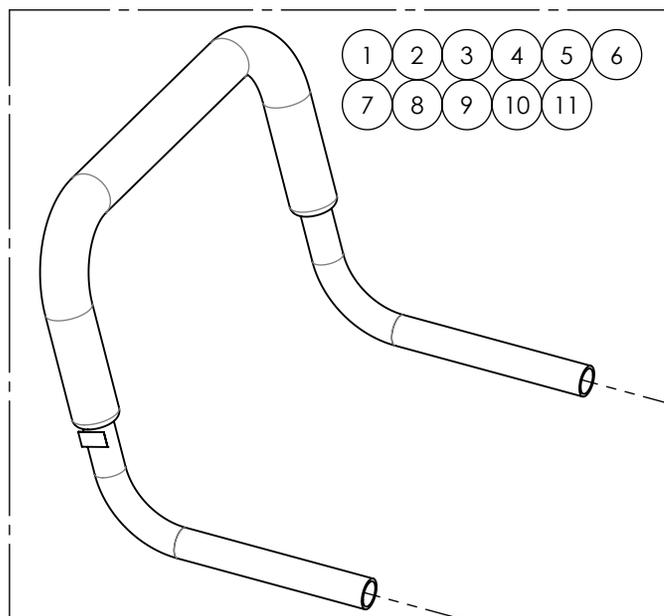

UTILISER LE MANCHON #0032001A-00 SI LA POIGNÉE DE POUSETTE (#0051523A À #0051533A) SERA INSTALLÉE AVEC LES MONTANTS DE DOSSIER ALUMINIUM DROIT AVEC POIGNÉE INTÉGRÉE (#9003298A OU #9003299A)

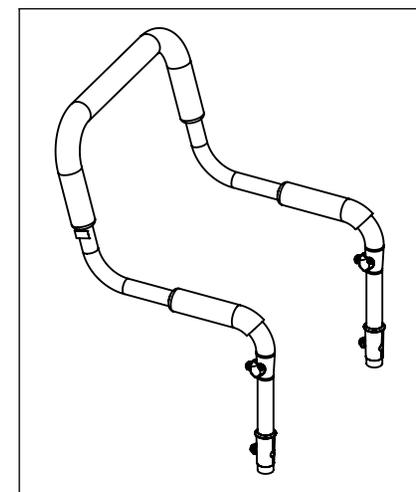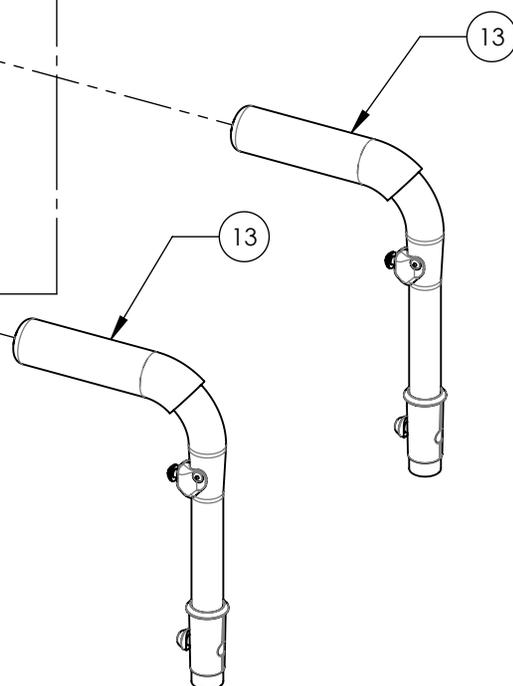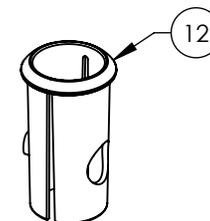


**0061910A_0061949A & 0062220A_0062318A
COUSSIN VELCRO À BOUCLE 2po**

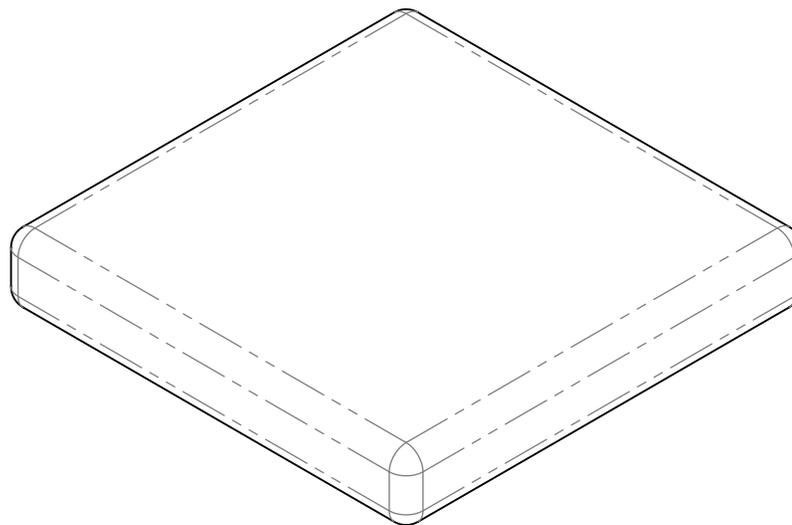

COUSSIN 2po		PROFONDEUR en pouces (cm)										
		10 (25.4)	11 (27.9)	12 (30.5)	13 (33.0)	14 (35.6)	15 (38.1)	16 (40.6)	17 (43.2)	18 (45.7)	19 (48.3)	20 (50.8)
LARGEUR en pouces (cm)	10 (25.4)	0061910	0061911	0061912	0061913	0061914	0061915	0061916	0061917	0061918	0061919	0061920
	11 (27.9)	0061921	0061922	0061923	0061924	0061925	0061926	0061927	0061928	0061929	0061930	0061931
	12 (30.5)	0061932	0061933	0062220	0062221	0062222	0062223	0062224	0062225	0062226	0062227	0062228
	13 (33.0)	0061934	0061935	0062229	0062230	0062231	0062232	0062233	0062234	0062235	0062236	0062237
	14 (35.6)	0061936	0061937	0062238	0062239	0062240	0062241	0062242	0062243	0062244	0062245	0062246
	15 (38.1)	0061938	0061939	0062247	0062248	0062249	0062250	0062251	0062252	0062253	0062254	0062255
	16 (40.6)	0061940	0061941	0062256	0062257	0062258	0062259	0062260	0062261	0062262	0062263	0062264
	17 (43.2)	0061942	0061943	0062265	0062266	0062267	0062268	0062269	0062270	0062271	0062272	0062273
	18 (45.7)	0061944	0061945	0062274	0062275	0062276	0062277	0062278	0062279	0062280	0062281	0062282
	19 (48.3)	0061946	0061947	0062283	0062284	0062285	0062286	0062287	0062288	0062289	0062290	0062291
20 (50.8)	0061948	0061949	0062292	0062293	0062294	0062295	0062296	0062297	0062298	0062299	0062300	


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

0061950A_0061989A & 0062319A_0062417A
COUSSIN VELCRO À BOUCLE 3po

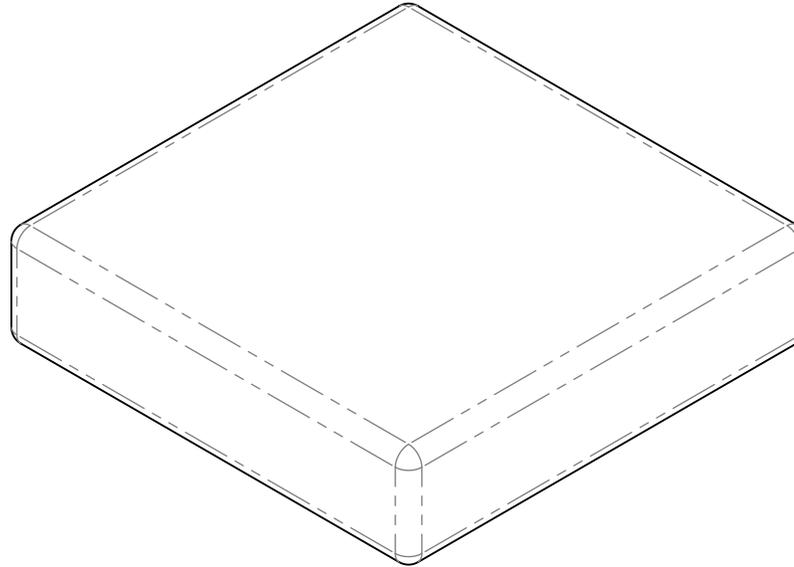

COUSSIN 3 po		PROFONDEUR en pouces (cm)										
		10 (25.4)	11 (27.9)	12 (30.5)	13 (33.0)	14 (35.6)	15 (38.1)	16 (40.6)	17 (43.2)	18 (45.7)	19 (48.3)	20 (50.8)
LARGEUR en pouces (cm)	10 (25.4)	0061950	0061951	0061952	0061953	0061954	0061955	0061956	0061957	0061958	0061959	0061960
	11 (27.9)	0061961	0061962	0061963	0061964	0061965	0061966	0061967	0061968	0061969	0061970	0061971
	12 (30.5)	0061972	0061973	0062319	0062320	0062321	0062322	0062323	0062324	0062325	0062326	0062327
	13 (33.0)	0061974	0061975	0062328	0062329	0062330	0062331	0062332	0062333	0062334	0062335	0062336
	14 (35.6)	0061976	0061977	0062337	0062338	0062339	0062340	0062341	0062342	0062343	0062344	0062345
	15 (38.1)	0061978	0061979	0062346	0062347	0062348	0062349	0062350	0062351	0062352	0062353	0062354
	16 (40.6)	0061980	0061981	0062355	0062356	0062357	0062358	0062359	0062360	0062361	0062362	0062363
	17 (43.2)	0061982	0061983	0062364	0062365	0062366	0062367	0062368	0062369	0062370	0062371	0062372
	18 (45.7)	0061984	0061985	0062373	0062374	0062375	0062376	0062377	0062378	0062379	0062380	0062381
	19 (48.3)	0061986	0061987	0062382	0062383	0062384	0062385	0062386	0062387	0062388	0062389	0062390
20 (50.8)	0061988	0061989	0062391	0062392	0062393	0062394	0062395	0062396	0062397	0062398	0062399	

0061990B_0062054B
DS SYNTECH-SUEDE V2

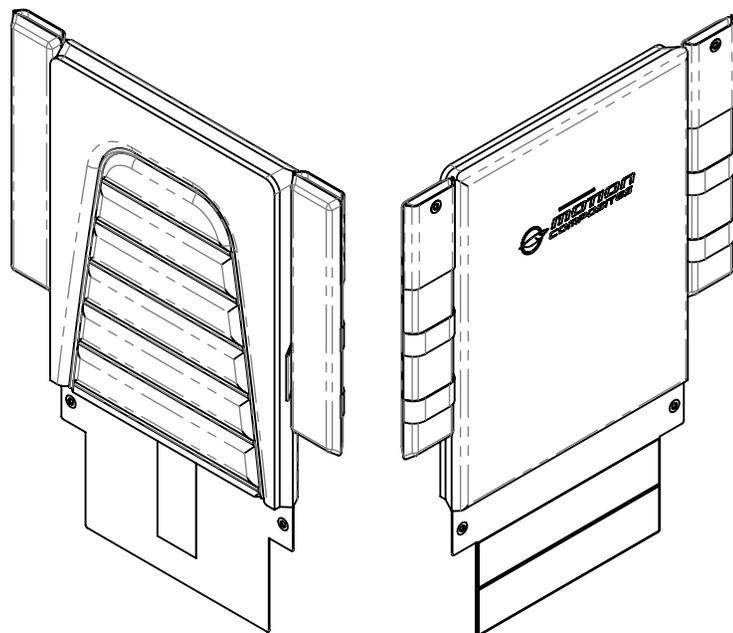

ex: 0062000B-00


Instance	# Patch Velcro à Boucles
-00	Aucun
-01	1 patch Velcro
-02	2 patchs velcro
-03	3 patchs velcro
-04	4 patchs velcro
-05	5 patchs velcro
-06	6 patchs velcro

DS SYNTECH-SUEDE V2 DOSSIER		LONGUEUR en pouces (cm)			
		9-12 (22.9-30.5)	12-15 (30.5-38.1)	15-18 (38.1-45.7)	18-21 (45.7-53.3)
LARGEUR en pouces (cm)	10 (25.4)	0061990	0061991	0061992	0061993
	11 (27.9)	0061995	0061996	0061997	0061998
	12 (30.5)	0062000	0062001	0062002	0062003
	13 (33.0)	0062005	0062006	0062007	0062008
	14 (35.6)	0062010	0062011	0062012	0062013
	15 (38.1)	0062015	0062016	0062017	0062018
	16 (40.6)	0062020	0062021	0062022	0062023
	17 (43.2)	0062025	0062026	0062027	0062028
	20 (50.8)	0062040	0062041	0062042	0062043

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9003678A 9003798A
TOILE DE SIÈGE CADRE RIGIDE À CROCHET (SPÉCIFIER GRANDEUR)

SANGLE DE 0.75po
 (19mm) DE LARGEUR
 UTILISÉ SEULEMENT À
 L'EXTRÉMITÉ ARRIÈRE DU
 SIÈGE

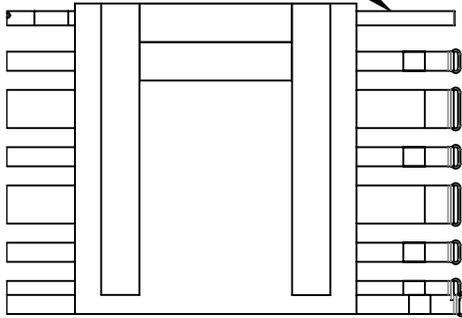


**PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR
 BAGUES DE SANGLE D'ASSISE**



0001360A-00

BAGUE DE SANGLE ASSISE ANTIDÉRAPANTE 1po

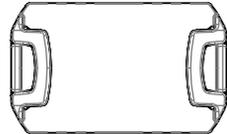

0001360A-01

BAGUE DE SANGLE ASSISE ANTIDÉRAPANTE 2po


PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR SANGLES DE SIÈGE

0.75po (19mm)		1po (25mm)		2po (51mm)	
Largeur de sangle de siège		Largeur de sangle de siège		Largeur de sangle de siège	
No. Item	Largeur du siège po (cm)	No. Item	Largeur du siège po (cm)	No. Item	Largeur du siège po (cm)
0060137A	10 (25.4)	0060111A	10 (25.4)	0060124A	10 (25.4)
0060138A	11 (27.9)	0060112A	11 (27.9)	0060125A	11 (27.9)
0060139A	12 (27.9)	0060113A	12 (30.5)	0060126A	12 (30.5)
0060140A	13 (27.9)	0060114A	13 (33)	0060127A	13 (33)
0060141A	14 (27.9)	0060115A	14 (35.6)	0060128A	14 (35.6)
0060142A	15 (27.9)	0060116A	15 (38.1)	0060129A	15 (38.1)
0060143A	16 (27.9)	0060117A	16 (40.6)	0060130A	16 (40.6)
0060144A	17 (27.9)	0060118A	17 (43.2)	0060131A	17 (43.2)
0060145A	18 (27.9)	0060119A	18 (45.7)	0060132A	18 (45.7)
0060146A	19 (27.9)	0060120A	19 (48.3)	0060133A	19 (48.3)
0060147A	20 (27.9)	0060121A	20 (50.8)	0060134A	20 (50.8)

TOUTES LES TOILES DE SIÈGES SONT ÉQUIPÉS DU NOMBRE
 DE SANGLES ET DE BAGUES DE SANGLES APPROPRIÉ





DIMENSIONS TOILE DE SIÈGE		LONGUEUR en pouces (cm)										
		10 (25.4)	11 (27.9)	12 (30.5)	13 (33.0)	14 (35.6)	15 (38.1)	16 (40.6)	17 (43.2)	18 (45.7)	19 (48.3)	20 (50.8)
LARGEUR en pouces (cm)	10 (25.4)	9003678 (0060399-00)	9003679 (0060399-01)	9003680 (0060399-02)	9003681 (0060399-03)	9003682 (0060399-04)	9003683 (0060399-05)	9003684 (0060399-06)	9003685 (0060399-07)	9003686 (0060399-08)	9003687 (0060399-09)	9003688 (0060399-10)
	11 (27.9)	9003689 (0060399-11)	9003690 (0060399-12)	9003691 (0060399-13)	9003692 (0060399-14)	9003693 (0060399-15)	9003694 (0060399-16)	9003695 (0060399-17)	9003696 (0060399-18)	9003697 (0060399-19)	9003698 (0060399-20)	9003699 (0060399-21)
	12 (30.5)	9003700 (0060399-22)	9003701 (0060399-23)	9003702 (0060399-24)	9003703 (0060399-25)	9003704 (0060399-26)	9003705 (0060399-27)	9003706 (0060399-28)	9003707 (0060399-29)	9003708 (0060399-30)	9003709 (0060399-31)	9003710 (0060399-32)
	13 (33.0)	9003711 (0060399-33)	9003712 (0060399-34)	9003713 (0060399-35)	9003714 (0060399-36)	9003715 (0060399-37)	9003716 (0060399-38)	9003717 (0060399-39)	9003718 (0060399-40)	9003719 (0060399-41)	9003720 (0060399-42)	9003721 (0060399-43)
	14 (35.6)	9003722 (0060399-44)	9003723 (0060399-45)	9003724 (0060399-46)	9003725 (0060399-47)	9003726 (0060399-48)	9003727 (0060399-49)	9003728 (0060399-50)	9003729 (0060399-51)	9003730 (0060399-52)	9003731 (0060399-53)	9003732 (0060399-54)
	15 (38.1)	9003733 (0060399-55)	9003734 (0060399-56)	9003735 (0060399-57)	9003736 (0060399-58)	9003737 (0060399-59)	9003738 (0060399-60)	9003739 (0060399-61)	9003740 (0060399-62)	9003741 (0060399-63)	9003742 (0060399-64)	9003743 (0060399-65)
	16 (40.6)	9003744 (0060399-66)	9003745 (0060399-67)	9003746 (0060399-68)	9003747 (0060399-69)	9003748 (0060399-70)	9003749 (0060399-71)	9003750 (0060399-72)	9003751 (0060399-73)	9003752 (0060399-74)	9003753 (0060399-75)	9003754 (0060399-76)
	17 (43.2)	9003755 (0060399-77)	9003756 (0060399-78)	9003757 (0060399-79)	9003758 (0060399-80)	9003759 (0060399-81)	9003760 (0060399-82)	9003761 (0060399-83)	9003762 (0060399-84)	9003763 (0060399-85)	9003764 (0060399-86)	9003765 (0060399-87)
	18 (45.7)	9003766 (0060399-88)	9003767 (0060399-89)	9003768 (0060399-90)	9003769 (0060399-91)	9003770 (0060399-92)	9003771 (0060399-93)	9003772 (0060399-94)	9003773 (0060399-95)	9003774 (0060399-96)	9003775 (0060399-97)	9003776 (0060399-98)
	19 (48.3)	9003777 (0060399-99)	9003778 (0005673-00)	9003779 (0005673-01)	9003780 (0005673-02)	9003781 (0005673-03)	9003782 (0005673-04)	9003783 (0005673-05)	9003784 (0005673-06)	9003785 (0005673-07)	9003786 (0005673-08)	9003787 (0005673-09)
20 (50.8)	9003788 (0005673-10)	9003789 (0005673-11)	9003790 (0005673-12)	9003791 (0005673-13)	9003792 (0005673-14)	9003793 (0005673-15)	9003794 (0005673-16)	9003795 (0005673-17)	9003796 (0005673-18)	9003797 (0005673-19)	9003798 (0005673-20)	

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

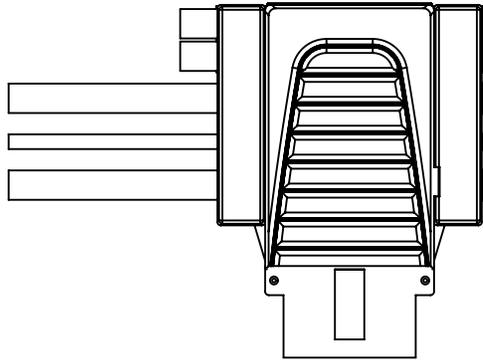

Tous les dossiers ont le nombre appropriés de sangles


Sangles de remplacement pour dossier

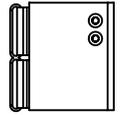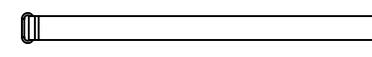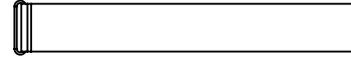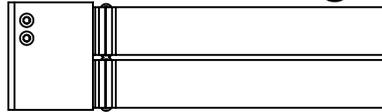

Sangles Hautes		Sangles Basses (2po (51mm))		Sangles Basses 1po (25mm)	
<i>1 par Dossier</i>		<i>Qté selon hauteur du dossier</i>		<i>Qté selon hauteur du dossier</i>	
No. Item	Largeur de dossier po (cm)	No. Item	Largeur de dossier po (cm)	No. Item	Largeur de dossier po (cm)
0062901A-00	10-11 (25.4-27.9)	0062900 A-00	10-11 (25.4-27.9)	0005550A-00	10-11 (25.4-27.9)
0063110A-00	12-13 (30.5-33)	0063117A-00	12-13 (30.5-33)	0005550A-01	12-13 (30.5-33)
0063111A-00	14-15 (35.6-38.1)	0063118A-00	14-15 (35.6-38.1)	0005550A-02	14-15 (35.6-38.1)
0063112A-00	16-17 (40.6-43.2)	0063119A-00	16-17 (40.6-43.2)	0005550A-03	16-17 (40.6-43.2)
0063113A-00	18-19 (45.7-48.3)	0063120A-00	18-19 (45.7-48.3)	0005550A-04	18-19 (45.7-48.3)
0063114A-00	20-21 (50.8-53.3)	0063121A-00	20-21 (50.8-53.3)	0005550A-05	20-21 (50.8-53.3)

Oreillette
<i>1 par Dossier</i>
No. Item
0063124A-00

DOSSIER SOUPLE À TENSION RÉGLABLE SYNTECH-SUEDE V2		LONGUEUR en pouces (cm)			
		9-12 (22.9-30.5)	12-15 (30.5-38.1)	15-18 (38.1-45.7)	18-21 (45.7-53.3)
NOMBRE DE SANGLES INCLUSES		1x 2" (51mm) 1x 1" (25mm)	1x 2" (51mm) 1x 1" (25mm)	2x 2" (51mm) 1x 1" (25mm)	2x 2" (51mm) 1x 1" (25mm)
LARGEUR en pouces (cm)	10 (25.4)	9008323A-00 (0061900B-00)	9008324A-00 (0061901B-00)	9008325A-00 (0061902B-00)	9008326A-00 (0061903B-00)
	11 (27.9)	9008328A-00 (0061905B-00)	9008329A-00 (0061906B-00)	9008330A-00 (0061907B-00)	9008331A-00 (0061908B-00)
	12 (30.5)	9008333A-00 (0062055B-00)	9008334A-00 (0062056B-00)	9008335A-00 (0062057B-00)	9008336A-00 (0062058B-00)
	13 (33.0)	9008338A-00 (0062060B-00)	9008339A-00 (0062061B-00)	9008340A-00 (0062062B-00)	9008341A-00 (0062063B-00)
	14 (35.6)	9008343A-00 (0062065B-00)	9008344A-00 (0062066B-00)	9008345A-00 (0062067B-00)	9008346A-00 (0062068B-00)
	15 (38.1)	9008348A-00 (0062070B-00)	9008349A-00 (0062071B-00)	9008350A-00 (0062072B-00)	9008351A-00 (0062073B-00)
	16 (40.6)	9008353A-00 (0062075B-00)	9008354A-00 (0062076B-00)	9008355A-00 (0062077B-00)	9008356A-00 (0062078B-00)
	17 (43.2)	9008358A-00 (0062080B-00)	9008359A-00 (0062081B-00)	9008360A-00 (0062082B-00)	9008361A-00 (0062083B-00)
	18 (45.7)	9008363A-00 (0062085B-00)	9008364A-00 (0062086B-00)	9008365A-00 (0062087B-00)	9008366A-00 (0062088B-00)
	19 (48.3)	9008368A-00 (0062090B-00)	9008369A-00 (0062091B-00)	9008370A-00 (0062092B-00)	9008371A-00 (0062093B-00)
	20 (50.8)	9008373A-00 (0062095B-00)	9008374A-00 (0062096B-00)	9008375A-00 (0062097B-00)	9008376A-00 (0062098B-00)

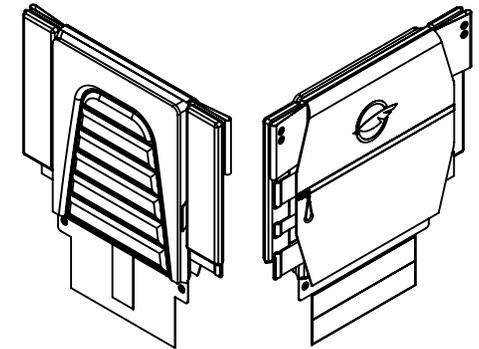


ex: 9008333A-00 (Dossier avec sangles)


ex: 0062055B-00 (Dossier seulement)

Instance	# Patch Velcro à Boucles
-00	Aucun
-01	1 patch Velcro
-02	2 patchs velcro
-03	3 patchs velcro
-04	4 patchs velcro
-05	5 patchs velcro
-06	6 patchs velcro

Catalogue de dossier et d'assise
Coussins

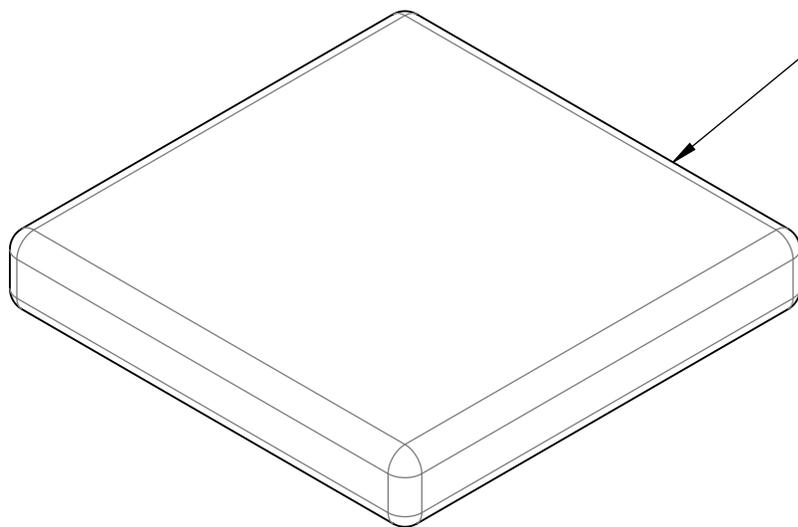


COUSSINS 2 po
SE RÉFÉRER À L'ITEM
0061910A_0061949A &
0062220A_0062318A

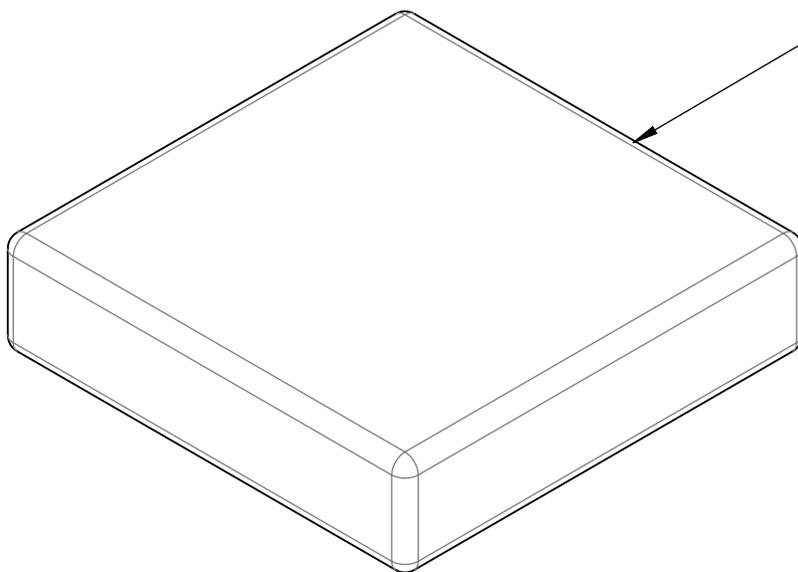

COUSSINS 3 po
SE RÉFÉRER À L'ITEM
0061950A_0061989A &
0062319A_0062417A

Catalogue de dossier et d'assise
Toile de siège cadre rigide à crochet

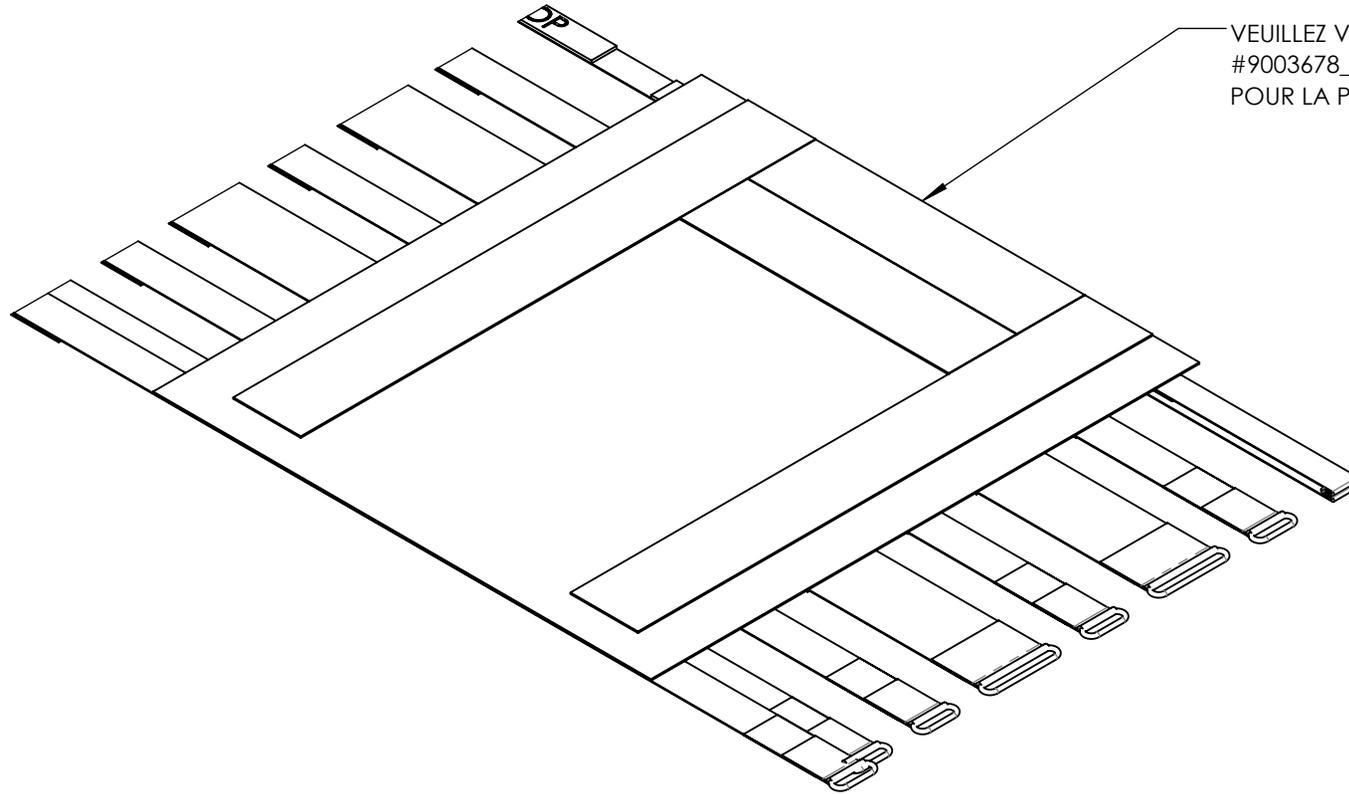

VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER A L'ARTICLE
#9003678_9003798
POUR LA PROFONDEUR ET LARGEUR


TOUTES LES TOILES DE SIÈGES ONT LE NOMBRE APPROPRIÉ
DE SANGLES ET BAGUES DE SANGLES.

Catalogue de dossier et d'assise
Dossier - Souple & souple à tension réglable, Syntech-Suede

DOSSIER SOUPLE SYNTECH-SUEDE
SE RÉFÉRER À L'ITEM

0061990B_0062054B *** NOUVEAU ***
9003571A_9003614A *** DÉSUET ***
(POUR REMPLACEMENT DE SANGLES SEULEMENT)


POUR LARGEUR & LONGUEUR

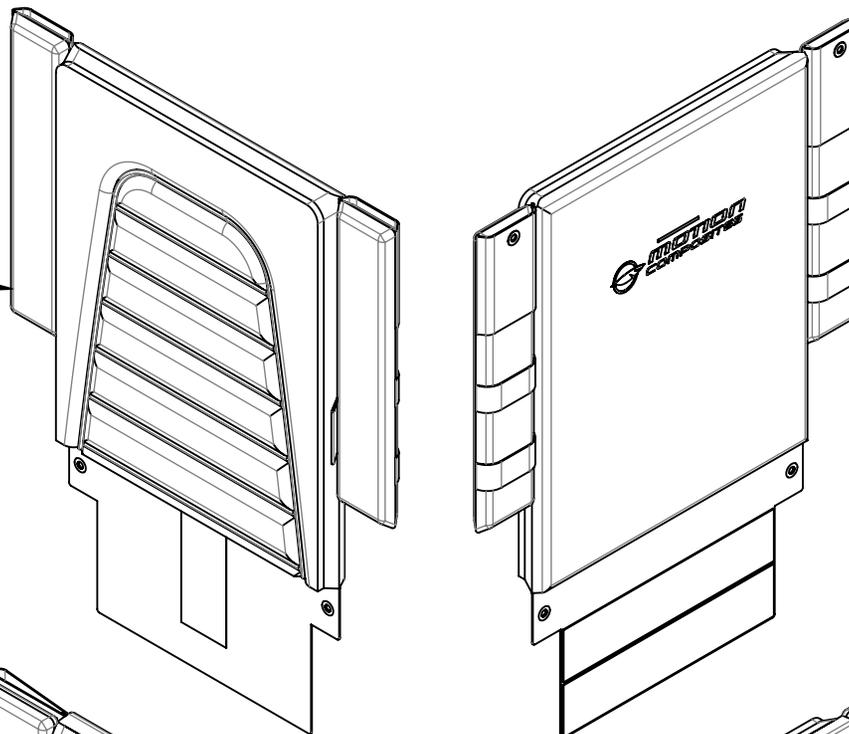

DOSSIER SOUPLE À TENSION RÉGLABLE
SYNTECH-SUEDE
SE RÉFÉRER À L'ITEM

9008323A_9008397A *** NOUVEAU ***
9003496A_9003539A *** DÉSUET ***
(POUR REMPLACEMENT DE SANGLES SEULEMENT)

POUR LARGEUR & LONGUEUR

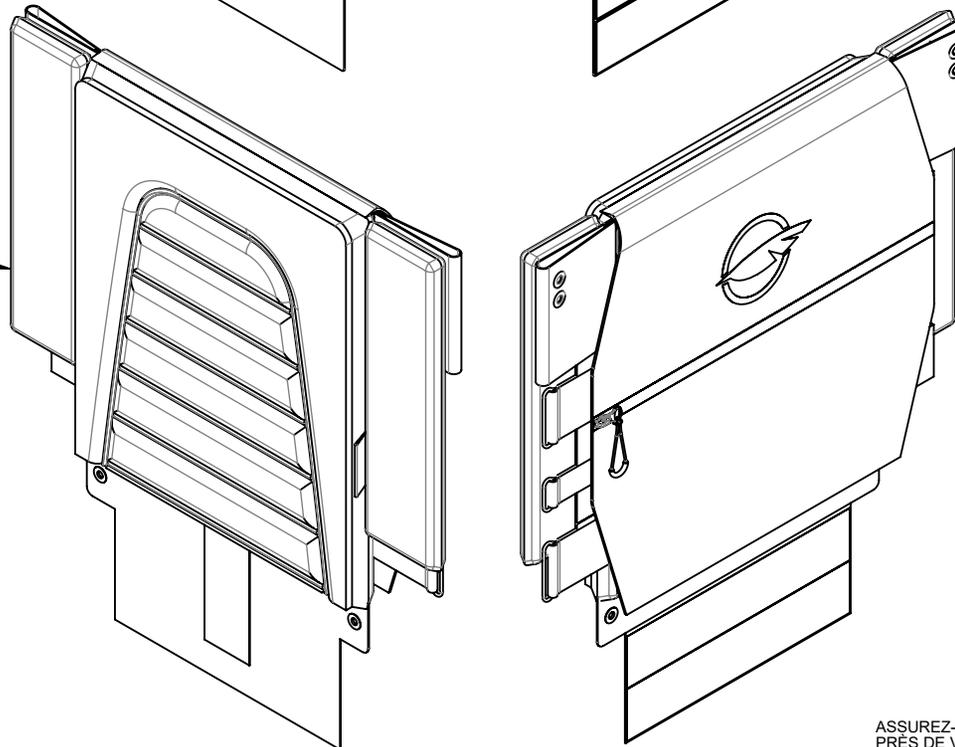


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

0007384A
NEWTON ONE AVEC INSERT ANTI-CREVAISON & PNEUMATIQUE 1 $\frac{3}{8}$ po

0007384A -


NO. ITEM	NO. PIÈCE	DESCRIPTION	00/QTÉ	01/QTÉ
1	0021110B-00	ROUE NEWTON ONE 22po	1	-
2	0021111B-00	ROUE NEWTON ONE 24po	-	1
3	9002409A-00	INSERT ANTI-CREVAISON & PNEUMATIQUE 1 $\frac{3}{8}$ x22po GRIS	1	-
4	9002410A-00	INSERT ANTI-CREVAISON & PNEUMATIQUE 1 $\frac{3}{8}$ x24po GRIS	-	1

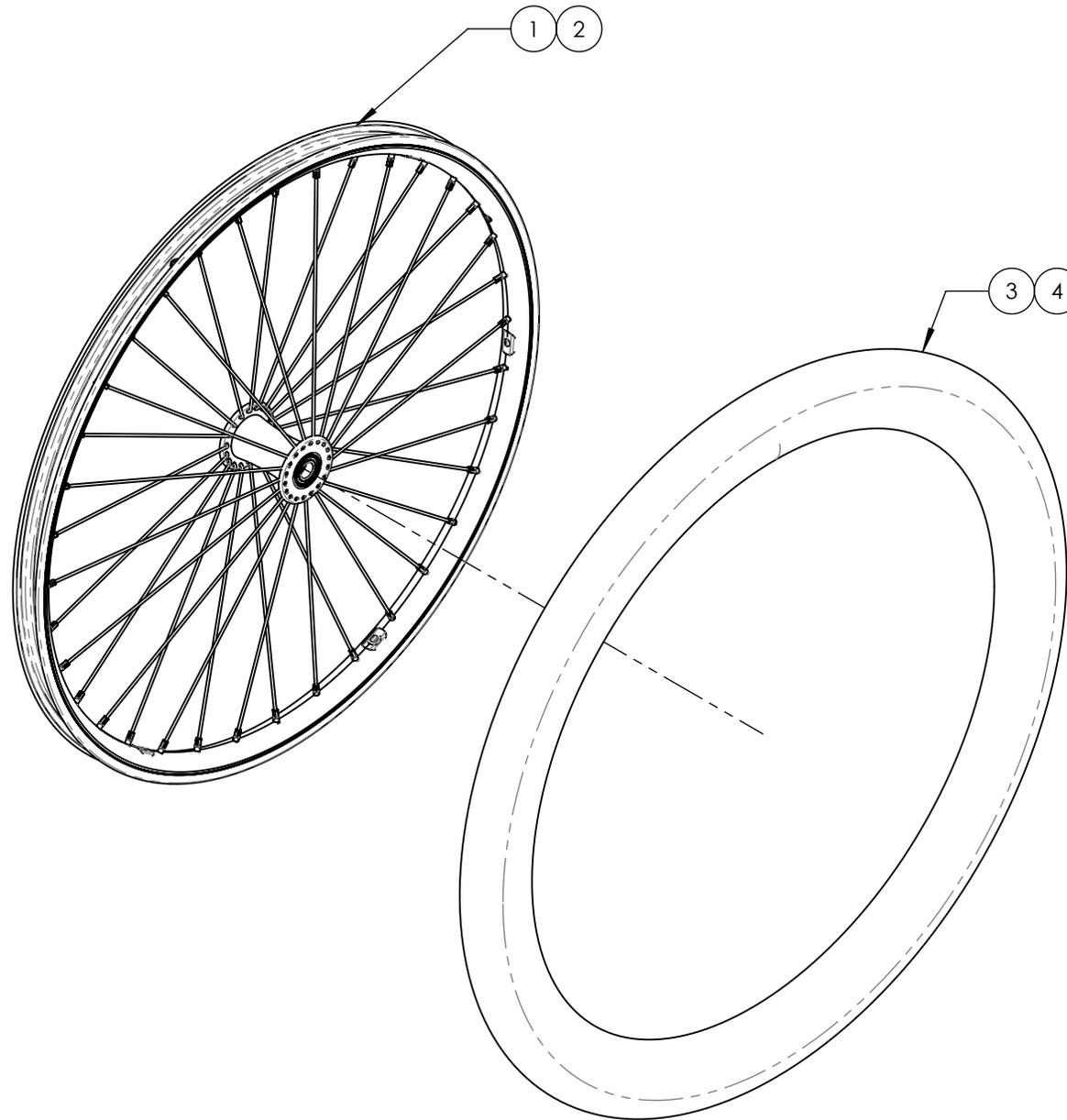

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

0007431A
N. GRAVITY & ANTI-CREVAISON & PNEUMATIQUE 1 $\frac{3}{8}$ po


0007431A -					
NO. ITEM	NO. PIÈCE	DESCRIPTION	00/QTY.	01/QTY.	02/QTY.
1	0021114A-00	ROUE NEWTON GRAVITY 22po	1	-	-
2	0021115A-00	ROUE NEWTON GRAVITY 24po	-	1	-
3	0021117A-00	ROUE NEWTON GRAVITY 26po	-	-	1
4	9002409A-00	INSERT ANTI-CREVAISON & PNEUMATIQUE 1 $\frac{3}{8}$ x22po GRIS	1	-	-
5	9002410A-00	INSERT ANTI-CREVAISON & PNEUMATIQUE 1 $\frac{3}{8}$ x24po GRIS	-	1	-
6	9002412A-00	INSERT ANTI-CREVAISON & PNEUMATIQUE 1 $\frac{3}{8}$ x26po GRIS	-	-	1

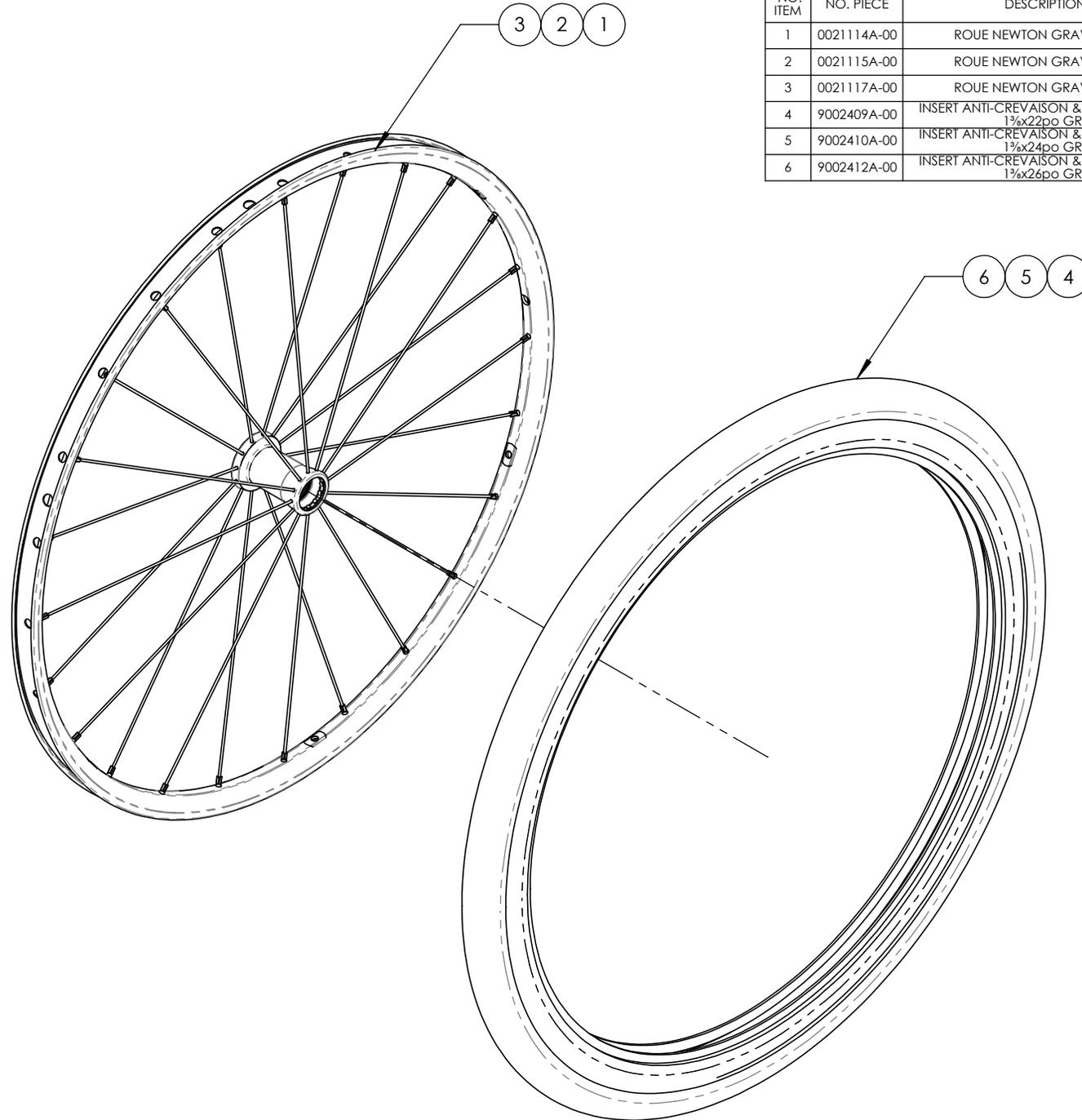


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9001006A & 9001558A 9001560A
CERCEAU DE CONDUITE - QUINCAILLERIE D'INSTALLATION


9001006A-00
 QUINCAILLERIE - CERCEAU, MAG 20po

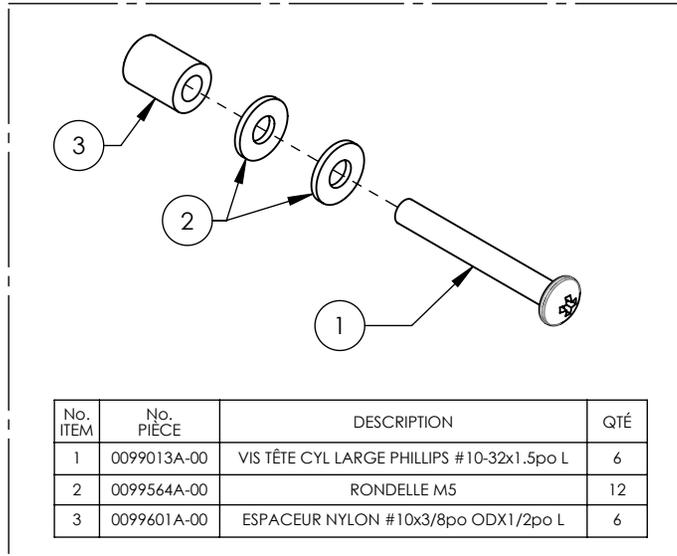


9001558A-00
 QUINCAILLERIE - CERCEAU, MAG 22 & 24po

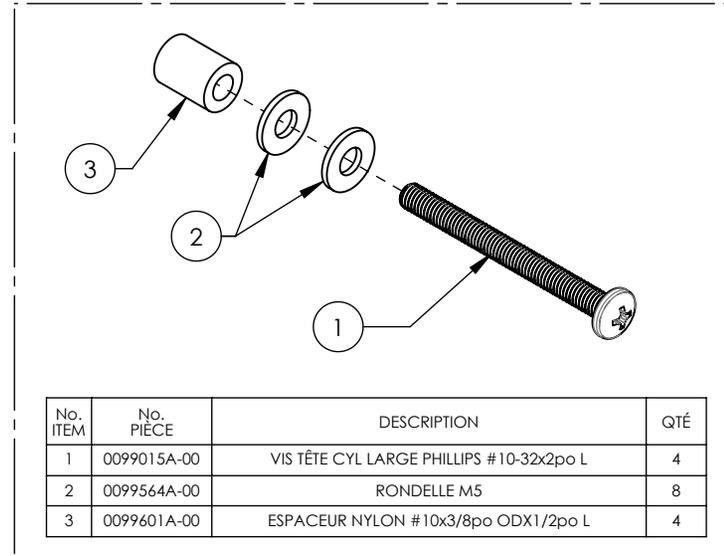

9001559A-00
 QUINCAILLERIE - CERCEAU, NEWTON ONE

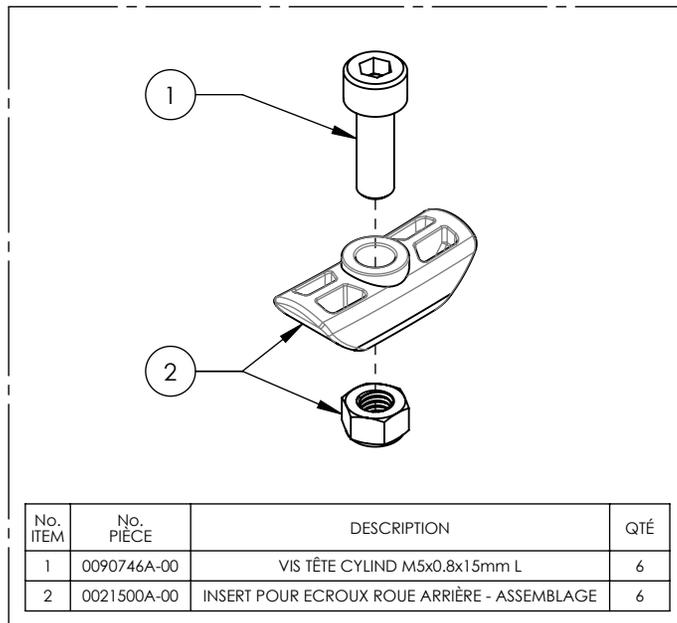

9001560A-00
 QUINCAILLERIE - CERCEAU, NEWTON GRAVITY & SPINERGY

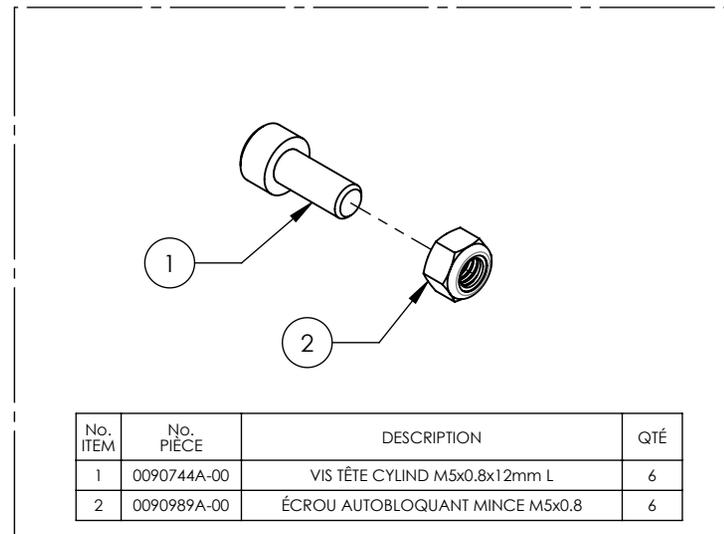


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


9001483A 9001485A
ROUE ARRIÈRE - PLASTIQUE MAG

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9001483-00	9001484-00	9001485-00
1	0021108B-00	CAP POUR ROUE PLASTIQUE MOULÉE	1	-	-
2	0021104A-00	CAP ROUE PLASTIQUE MOULÉE	-	1	1



9001483A-00
 ROUE ARRIÈRE - PLASTIQUE MAG, 20po

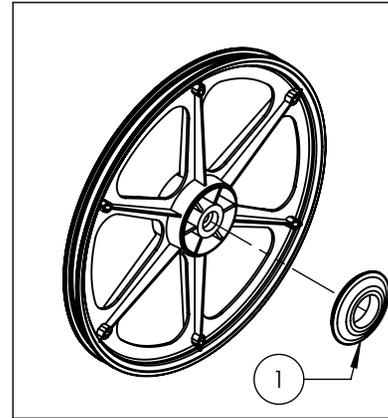

9001484A-00
 ROUE ARRIÈRE - PLASTIQUE MAG, 22po

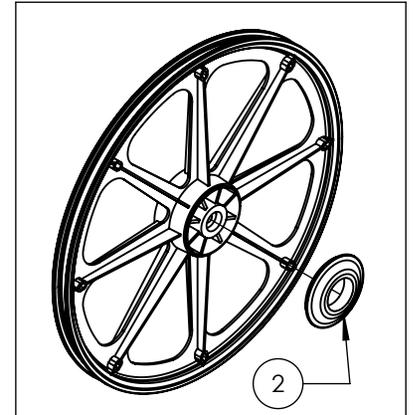


9001485A-00
 ROUE ARRIÈRE - PLASTIQUE MAG, 24po

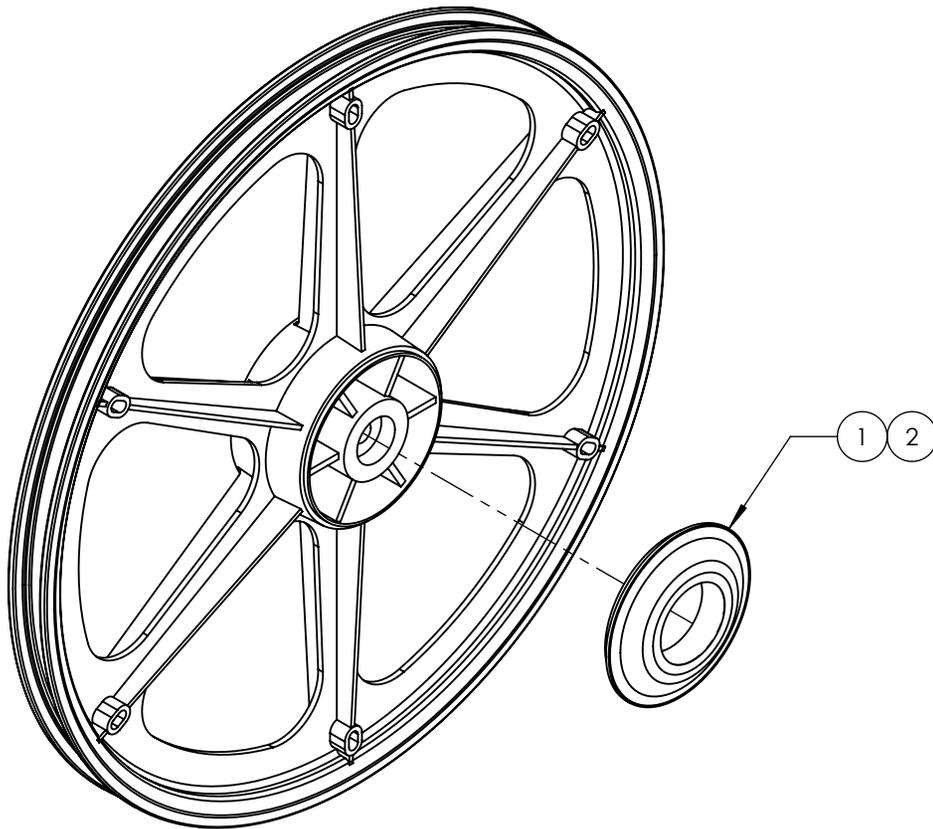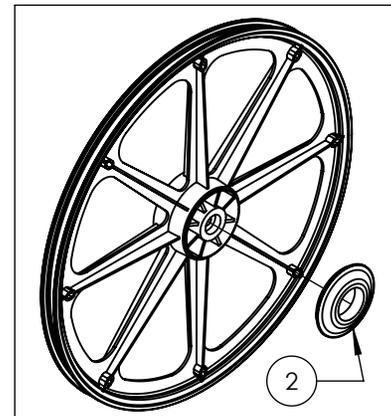


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001562A & 9002956A
ESSIEU - FILLETÉ**



9001562A & 9002956A - ESSIEU - FILLETÉ POUR ROUE MAG

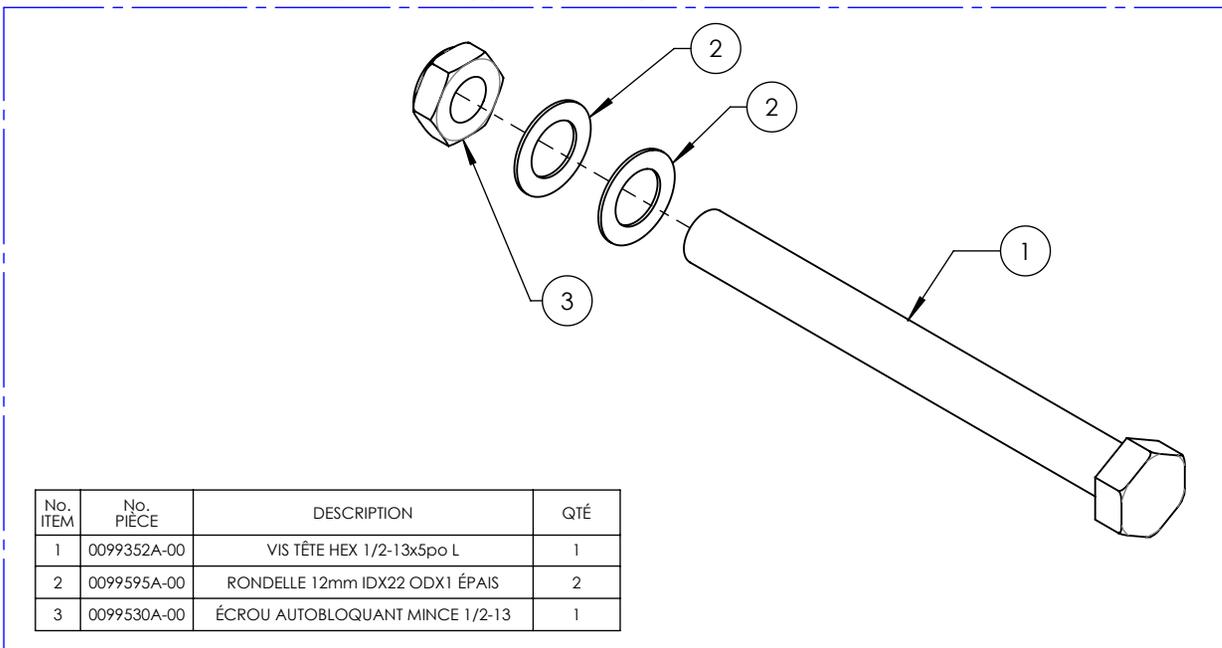


9001562A & 9002956A - ESSIEU - FILLETÉ

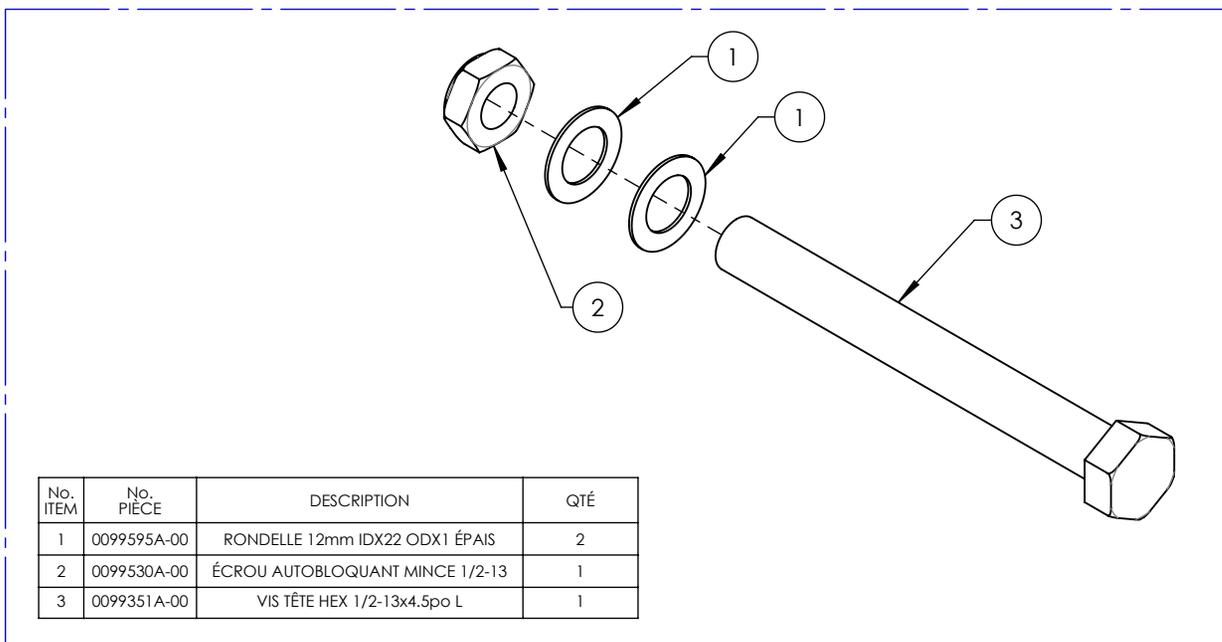


**9001629A 9001632A
PROTÈGES-RAYONS**

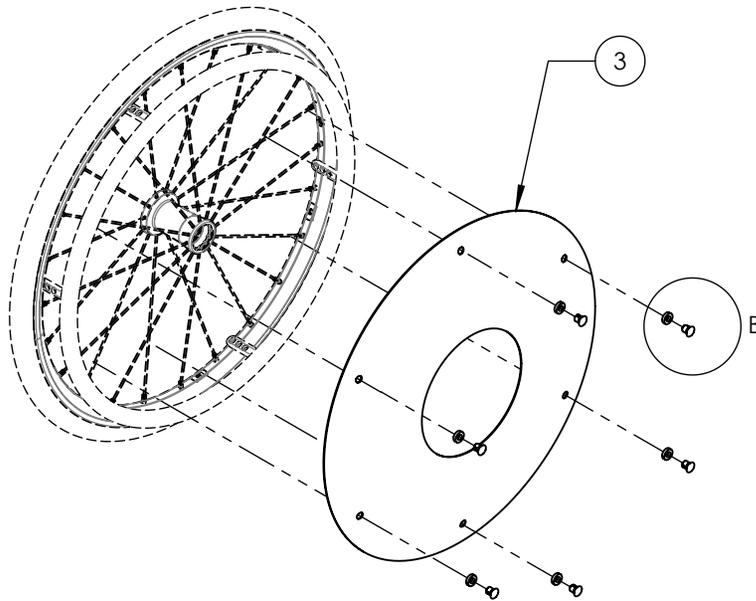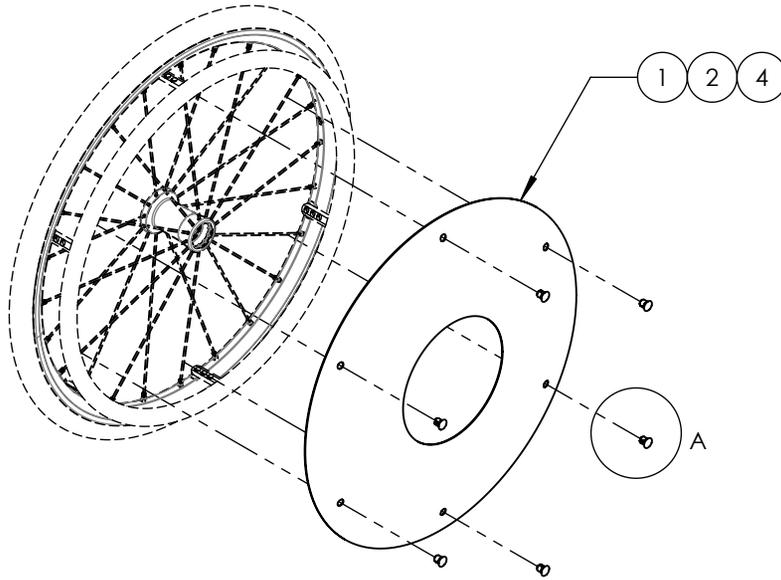

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9001629	9001630	9001631	9001632
1	0051019A-00	PROTÈGE RAYON 20po	1	-	-	-
2	0051020A-00	PROTÈGE RAYON 22po	-	1	-	-
3	0051021A-00	PROTÈGE RAYON 24po	-	-	1	-
4	0051025A-00	PROTÈGE RAYON 26po	-	-	-	1
5	0051034A-00	ATTACHE PROTÈGE RAYON	6	6	6	6
6	0051033A-00	RONDELLE ATTACHE PROTÈGE RAYON	-	-	6	-

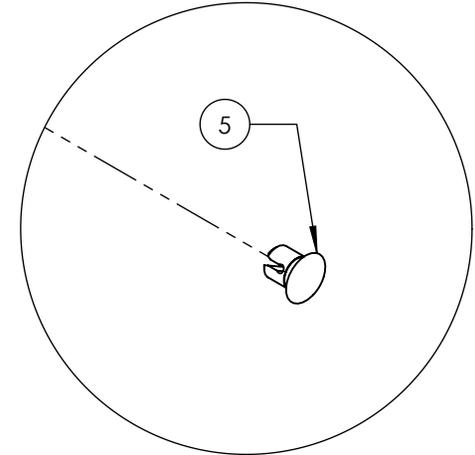

DETAIL A
ÉCHELLE 5 : 8

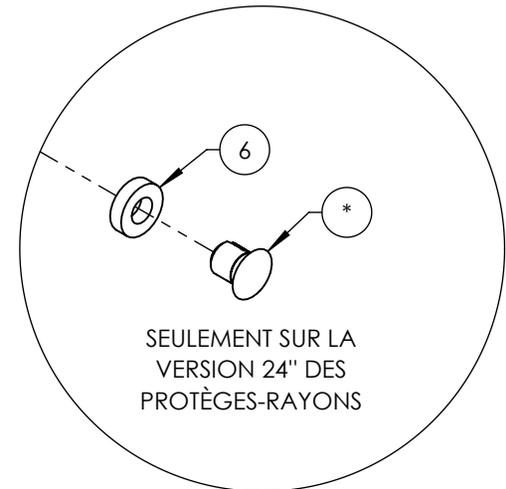

SEULEMENT SUR LA
VERSION 24" DES
PROTÈGES-RAYONS

DETAIL B
ÉCHELLE 5 : 8

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


**9002497A & 9002505A 9002510A & 9002519A
ROUE ARRIÈRE NEWTON & PNEU HP**

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9002497	9002505	9002506	9002507	9002508	9002509	9002510	9002519
1	0021118A-00	ROUE NEWTON ONE 20po	1	-	-	-	-	-	-	-
2	0021110B-00	ROUE NEWTON ONE 22po	-	1	-	-	-	-	-	-
3	0021111B-00	ROUE NEWTON ONE 24po	-	-	1	-	-	-	-	-
4	0021113A-00	ROUE NEWTON GRAVITY 20po	-	-	-	1	-	-	-	-
5	0021114A-00	ROUE NEWTON GRAVITY 22po	-	-	-	-	1	-	-	-
6	0021115B-00	ROUE NEWTON GRAVITY 24po	-	-	-	-	-	1	-	-
7	0021116A-00	ROUE NEWTON GRAVITY 25po	-	-	-	-	-	-	-	1
8	0021117A-00	ROUE NEWTON GRAVITY 26po	-	-	-	-	-	-	1	-
9	0021064A-00	FOND DE JANTE 20po	1	-	-	1	-	-	-	-
10	0021065A-00	FOND DE JANTE 22po	-	1	-	-	1	-	-	-
11	0021066A-00	FOND DE JANTE 24po	-	-	1	-	-	1	-	-
12	0021067A-00	FOND DE JANTE 25po	-	-	-	-	-	-	-	1
13	0021068A-00	FOND DE JANTE 26po	-	-	-	-	-	-	1	-
14	0021250A-00	CHAMBRE À AIR SCHRADER 20x1po	1	-	-	1	-	-	-	-
15	0021251A-00	CHAMBRE À AIR SCHRADER 22x1po	-	1	-	-	1	-	-	-
16	0021252A-00	CHAMBRE À AIR SCHRADER 24x1po	-	-	1	-	-	1	-	-
17	0021253A-00	CHAMBRE À AIR SCHRADER 25x1po	-	-	-	-	-	-	-	1
18	0021254A-00	CHAMBRE À AIR SCHRADER 26x1po	-	-	-	-	-	-	1	-
19	0021305A-00	PNEUS HP RIGHTRUN 20x1po	1	-	-	1	-	-	-	-
20	0021306A-00	PNEUS HP RIGHTRUN 22x1po	-	1	-	-	-	-	-	-
21	0021301B-00	PNEUS HP 22x1po	-	-	-	-	1	-	-	-
22	0021307A-00	PNEUS HP RIGHTRUN 24x1po	-	-	1	-	-	1	-	-
23	0021308A-00	PNEUS HP RIGHTRUN 25x1po	-	-	-	-	-	-	-	1
24	0021309A-00	PNEUS HP RIGHTRUN 26x1po	-	-	-	-	-	-	1	-
25	9001559A-00	QUINCAILLERIE - CERCEAU, NEWTON ONE	1	1	1	-	-	-	-	-

**ENSEMBLE DE QUINCAILLERIE (#9001559A-00) EST
INCLUS DANS TOUTES LES ROUES NEWTON ONE**


NEWTON ONE

9002497, 9002505 & 9002506

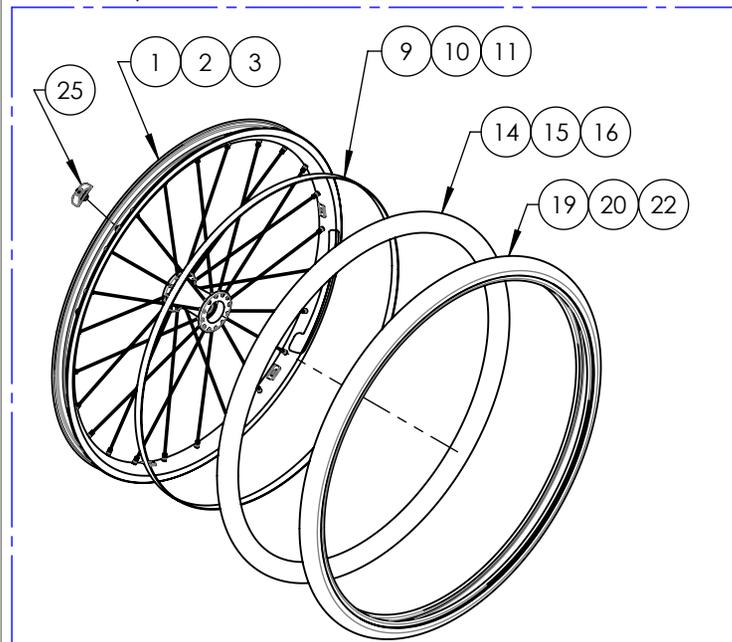

NEWTON GRAVITY

9002507, 9002508, 9002509 & 9002510

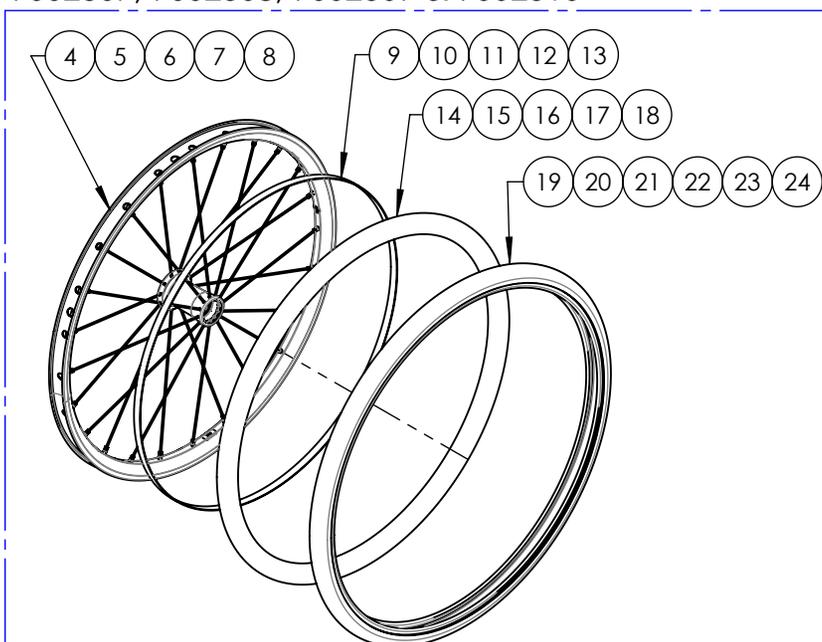

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


**9002498A & 9002511A 9002516A & 9002520A
ROUE ARRIÈRE NEWTON & PNEU PRESSION STANDARD**

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9002498	9002511	9002512	9002513	9002514	9002515	9002516	9002520
1	0021118A-00	ROUE NEWTON ONE 20po	1	-	-	-	-	-	-	-
2	0021110B-00	ROUE NEWTON ONE 22po	-	1	-	-	-	-	-	-
3	0021111B-00	ROUE NEWTON ONE 24po	-	-	1	-	-	-	-	-
4	0021113A-00	ROUE NEWTON GRAVITY 20po	-	-	-	1	-	-	-	-
5	0021114A-00	ROUE NEWTON GRAVITY 22po	-	-	-	-	1	-	-	-
6	0021115B-00	ROUE NEWTON GRAVITY 24po	-	-	-	-	-	1	-	-
7	0021116A-00	ROUE NEWTON GRAVITY 25po	-	-	-	-	-	-	-	1
8	0021117A-00	ROUE NEWTON GRAVITY 26po	-	-	-	-	-	-	1	-
9	0021064A-00	FOND DE JANTE 20po	1	-	-	1	-	-	-	-
10	0021065A-00	FOND DE JANTE 22po	-	1	-	-	1	-	-	-
11	0021066A-00	FOND DE JANTE 24po	-	-	1	-	-	1	-	-
12	0021067A-00	FOND DE JANTE 25po	-	-	-	-	-	-	-	1
13	0021068A-00	FOND DE JANTE 26po	-	-	-	-	-	-	1	-
14	0021255A-00	CHAMBRE À AIR SCHRADER 20x1 $\frac{3}{8}$ po	1	-	-	1	-	-	-	-
15	0021256A-00	CHAMBRE À AIR SCHRADER 22x1 $\frac{3}{8}$ po	-	1	-	-	1	-	-	-
16	0021257A-00	CHAMBRE À AIR SCHRADER 24x1 $\frac{3}{8}$ po	-	-	1	-	-	1	-	-
17	0021253A-00	CHAMBRE À AIR SCHRADER 25x1 po	-	-	-	-	-	-	-	1
18	0021259A-00	CHAMBRE À AIR SCHRADER 26x1 $\frac{3}{8}$ po	-	-	-	-	-	-	1	-
19	0021315A-00	PNEUS PNEUMATIQUE 20x1-3/8po	1	-	-	1	-	-	-	-
20	0021316A-00	PNEUS PNEUMATIQUE 22x1-3/8po	-	1	-	-	1	-	-	-
21	0021317A-00	PNEUS PNEUMATIQUE 24x1-3/8po	-	-	1	-	-	1	-	-
22	0021318A-00	PNEUS PNEUMATIQUE 25x1-3/8po	-	-	-	-	-	-	-	1
23	0021319A-00	PNEUS PNEUMATIQUE 26x1-3/8po	-	-	-	-	-	-	1	-
24	9001559A-00	QUINCAILLERIE - CERCEAU, NEWTON ONE	1	1	1	-	-	-	-	-

**ENSEMBLE DE QUINCAILLERIE (#9001559A-00) EST
INCLUS DANS TOUTES LES ROUES NEWTON ONE**


NEWTON ONE

9002498, 9002511 & 9002512

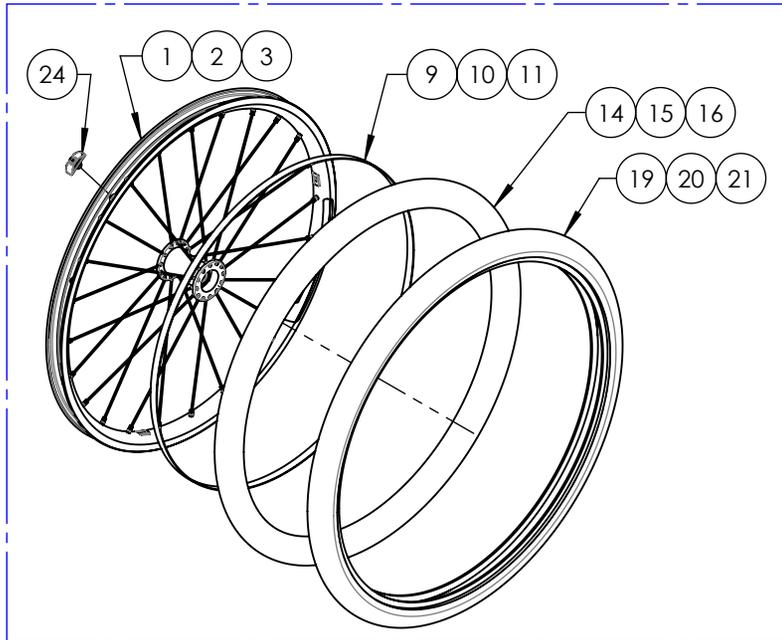

NEWTON GRAVITY

9002513, 9002514, 9002515, 9002520 & 9002516

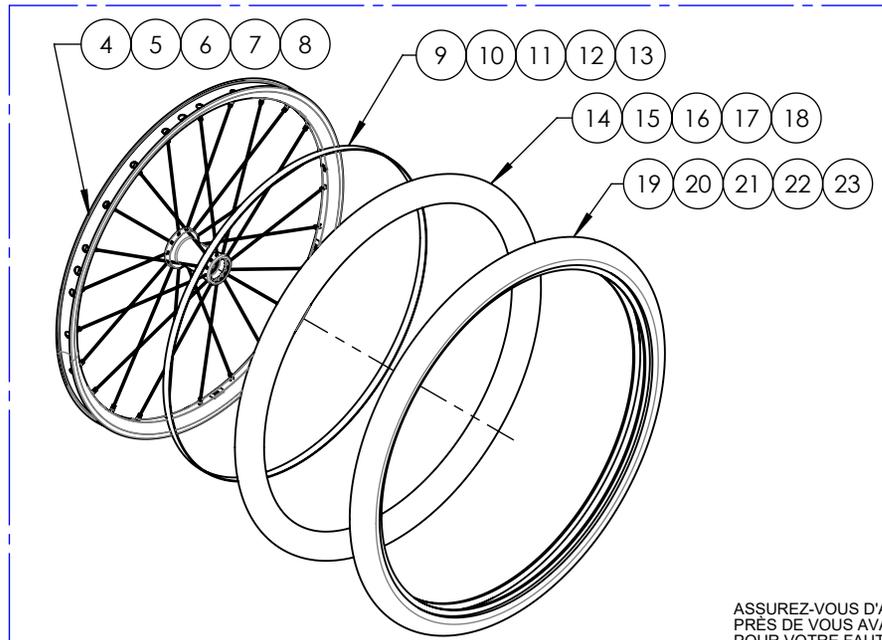


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9002499A 9002504A
ROUE ARRIÈRE NEWTON & PNEU SEMI-DUR

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9002499A	9002500A	9002501A	9002502A	9002503A	9002504A
1	0021118A-00	ROUE NEWTON ONE 20po	1	-	-	-	-	-
2	0021110B-00	ROUE NEWTON ONE 22po	-	1	-	-	-	-
3	0021111B-00	ROUE NEWTON ONE 24po	-	-	1	-	-	-
4	0021113A-00	ROUE NEWTON GRAVITY 20po	-	-	-	1	-	-
5	0021114A-00	ROUE NEWTON GRAVITY 22po	-	-	-	-	1	-
6	0021115B-00	ROUE NEWTON GRAVITY 24po	-	-	-	-	-	1
7	0021365A-00	PNEUS SEMI-DURS 20x1-1/4po	1	-	-	1	-	-
8	0021366B-00	PNEUS SEMI-DURS 22x1-1/4po	-	1	-	-	1	-
9	0021367B-00	PNEUS SEMI-DURS 24x1-1/4po	-	-	1	-	-	1
10	9001559A-00	QUINCAILLERIE - CERCEAU, NEWTON ONE	1	1	1	-	-	-


NEWTON ONE

9002499A, 9002500A & 9002501A

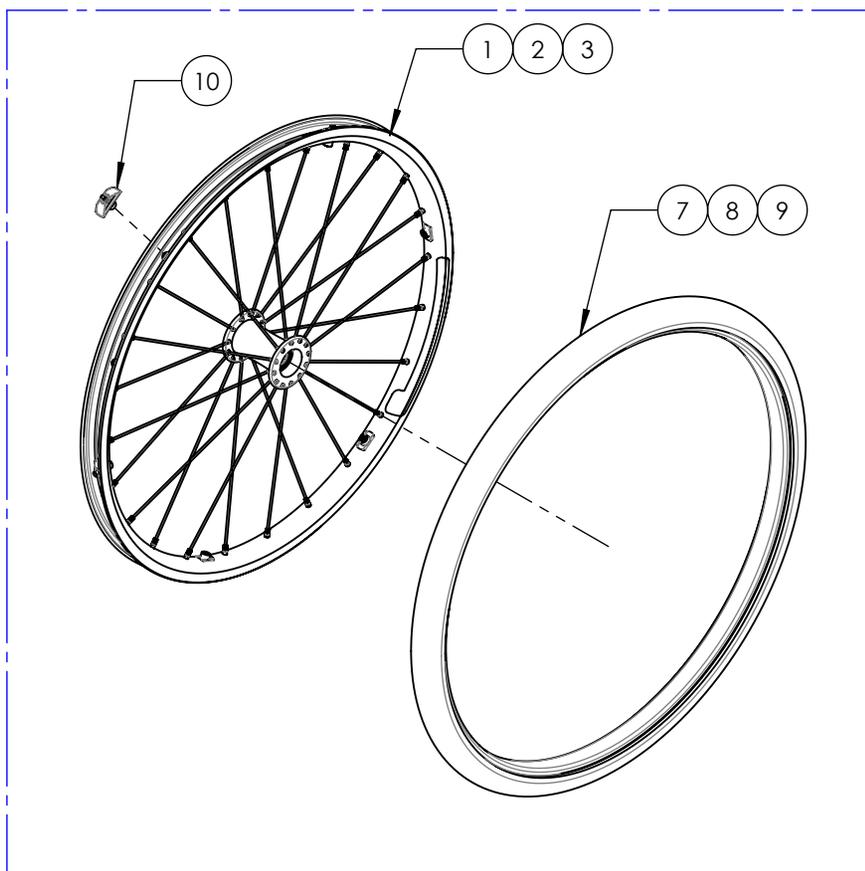

NEWTON GRAVITY

9002502A, 9002503A & 9002504A

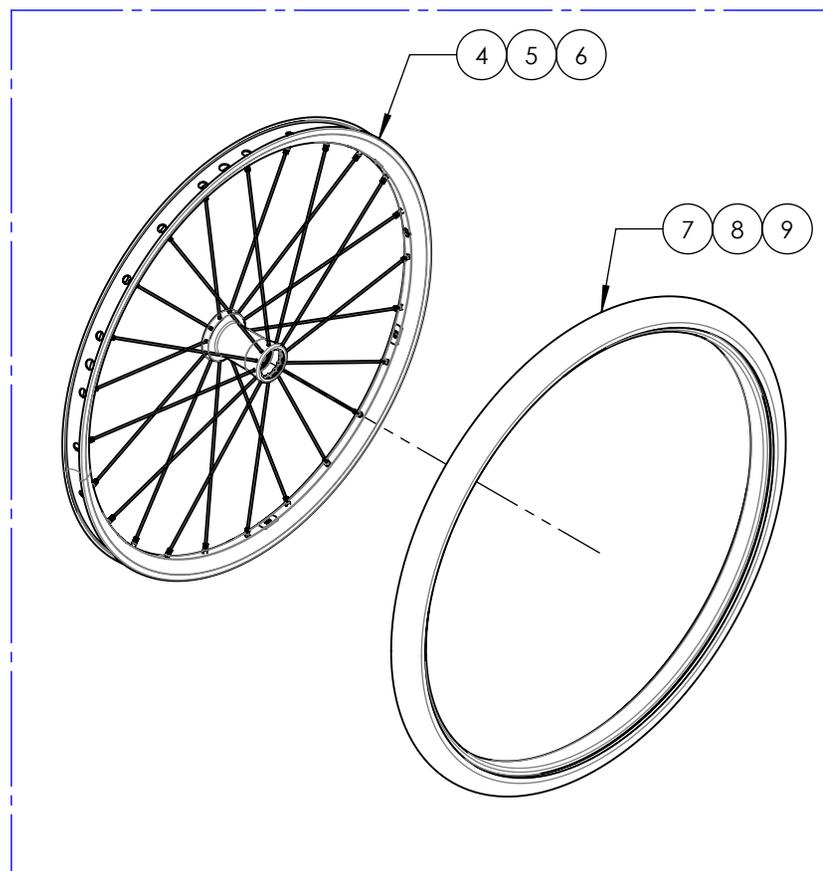


**ENSEMBLE DE QUINCAILLERIE (#9001559A-00) EST
 INCLUS DANS TOUTES LES ROUES NEWTON ONE**

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


9002896A 9002897A
ESSIEUX POUR ROUES SPINERGY SPOX & LX

9002896A-00 -
 ESSIEU - À DÉGAGEMENT RAPIDE, POUR ROUE SPINERGY

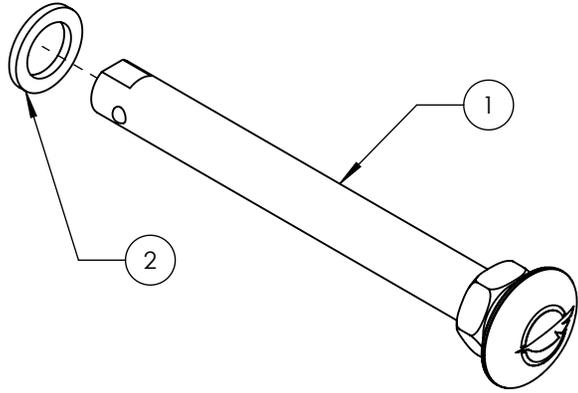

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9002896
1	0021014A-00	ESSIEUX À DÉGAGEMENT RAPIDE	1
2	0099563A-00	RONDELLE M12	1

9002897A-00 -
 ESSIEU - POUR QUADRAPLÉGIQUE, POUR ROUE SPINERGY

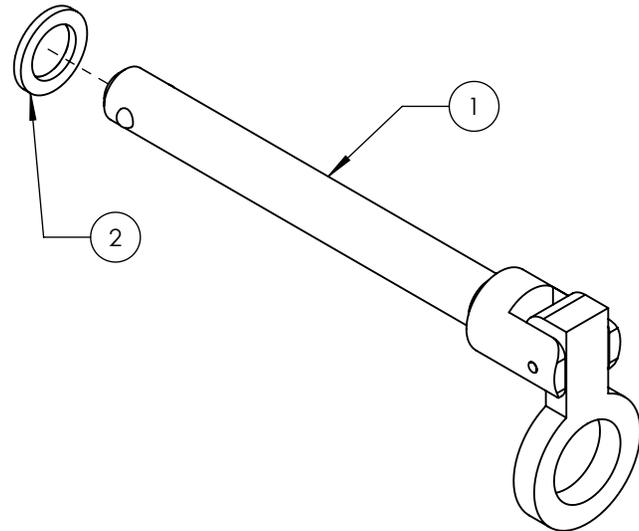


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9002897
1	0021015A-00	ESSIEUX À DÉGAGEMENT RAPIDE QUAD	1
2	0099563A-00	RONDELLE M12	1


9008110A_9008112A
QUINCAILLERIE V2 - CERCEAU, MAG

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9008110	9008111	9008112
1	0099015A-00	VIS TÊTE CYL LARGE PHILLIPS #10-32x2po L	-	4	4
2	0099013A-00	VIS TÊTE CYL LARGE PHILLIPS #10-32x1.5po L	6	-	-
3	0099564A-00	RONDELLE M5	6	4	8
4	0099601A-00	ESPACEUR NYLON #10x3/8po ODX1/2po L	6	4	4


9008110A-00
 QUINCAILLERIE V2 - CERCEAU, MAG 20po

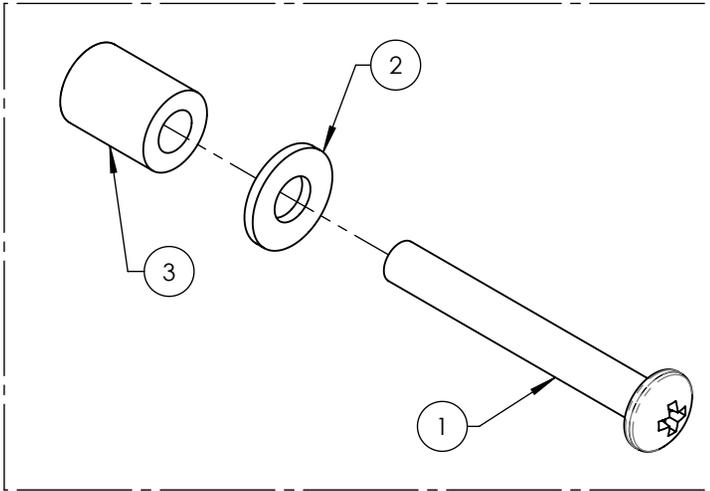

9008111A-00
 QUINCAILLERIE V2 - CERCEAU, MAG 22po

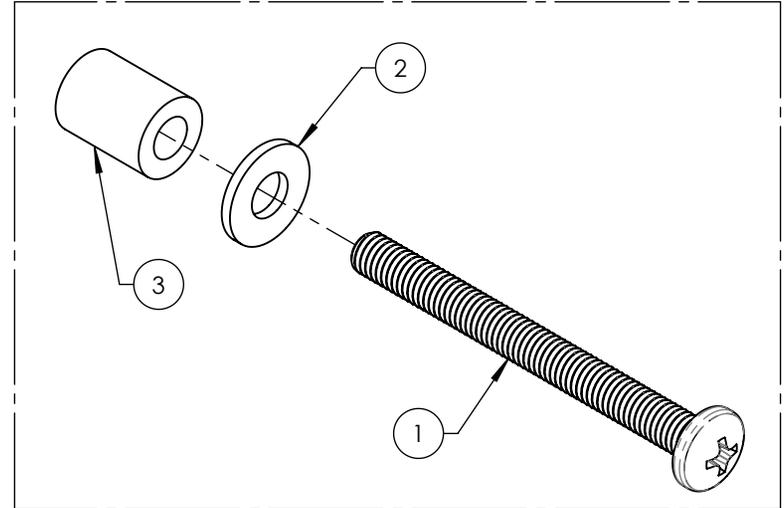


9008112A-00
 QUINCAILLERIE V2 - CERCEAU, MAG 24po

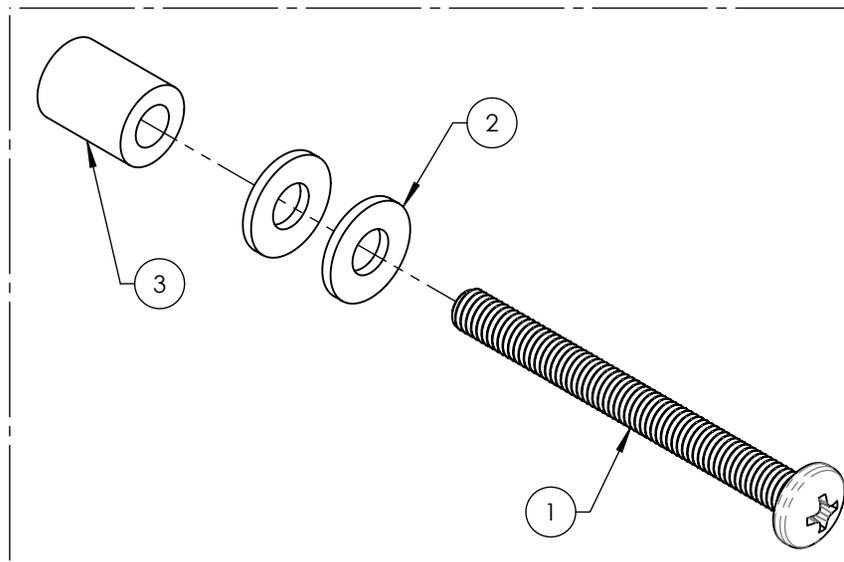


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9010381A-00
TUBE DE MONTAGE - STD, DROITE

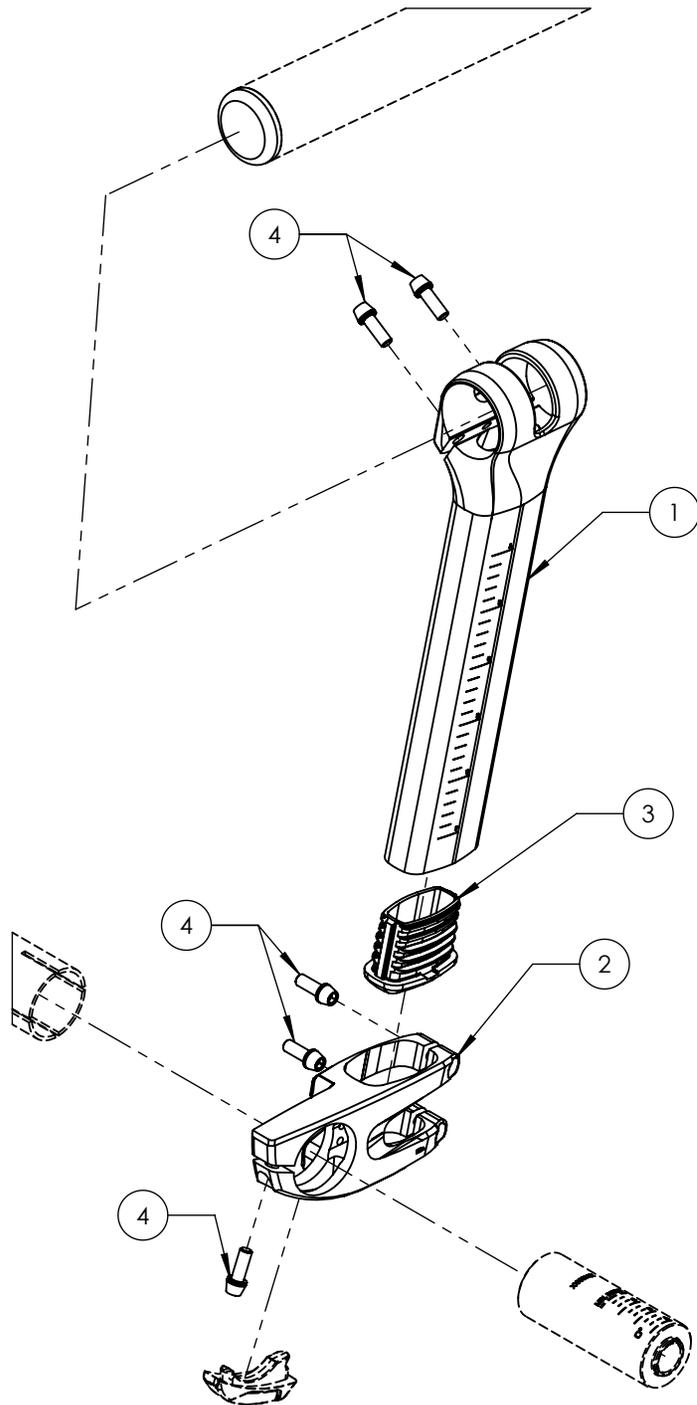

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1*	0021601A-00	TUBE DE MONTAGE ROUE ARRIÈRE DROITE	1
2	0021602B-00	CLAMP DE TUBE DE CAMBRURE DROITE	1
3	0021614A-00	BOUCHON DE SUPPORT DE ROUE ARRIÈRE NOIR	1
4	0092024A-00	VIS TÊTE PROFILÉE M5x0.8x14mm L	5

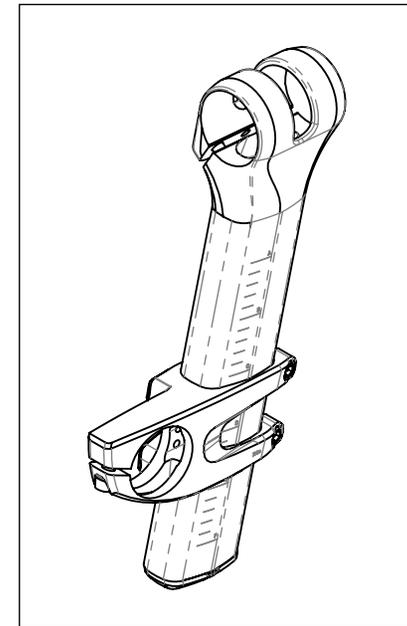



* NOTE: VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE A LA CLIENTÈLE AVANT DE COMMANDER LE TUBE DE MONTAGE (#21601)

L'ARTICLE DOIT ÊTRE USINÉ PAR MOTION COMPOSITES SELON LES SPÉCIFICATIONS DU FAUTEUIL
(FOURNIR LE NUMÉRO DE SÉRIE DU FAUTEUIL SVP)

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9010382A-00
TUBE DE MONTAGE - STD, GAUCHE

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1 *	0021600A-00	TUBE DE MONTAGE ROUE ARRIÈRE GAUCHE	1
2	0021603B-00	CLAMP DE TUBE DE CAMBRURE GAUCHE	1
3	0021614A-00	BOUCHON DE SUPPORT DE ROUE ARRIÈRE NOIR	1
4	0092024A-00	VIS TÊTE PROFILÉE M5x0.8x14mm L	5

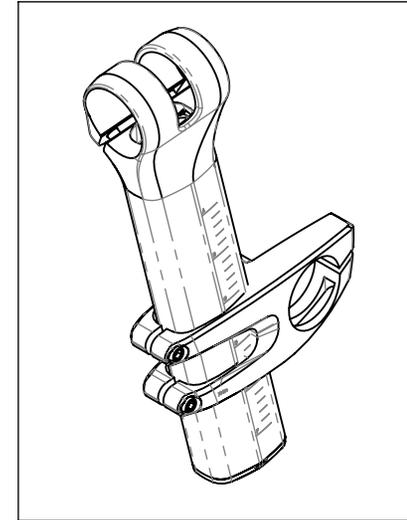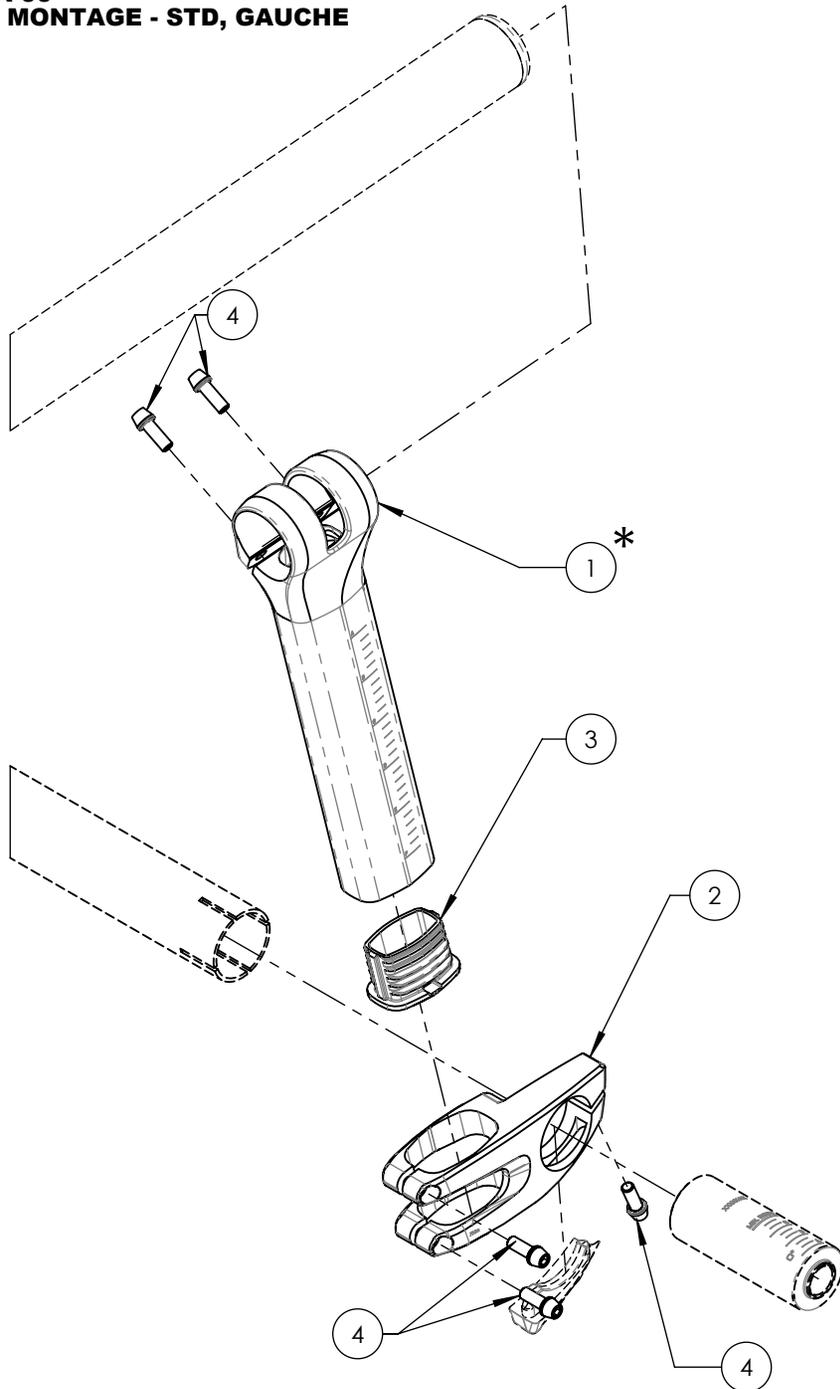


*** NOTE: VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE AVANT DE COMMANDER LA TUBE DE MONTAGE (#21600)**

L'ARTICLE DOIT ÊTRE USINÉ PAR MOTION COMPOSITES SELON LES SPÉCIFICATIONS DU FAUTEUIL (FOURNIR LE NUMÉRO DE SÉRIE DU FAUTEUIL SVP)

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9010383A 9010387A
Receptacle essieu - RF


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9010383 /QTE	9010384 /QTE	9010385 /QTE	9010386 /QTE	9010387 /QTE
1	0021043A-00	RECEPTACLE ESSIEUX 0 DEG	1	-	-	-	-
2	0021044A-00	RECEPTACLE ESSIEUX 2 DEG	-	1	-	-	-
3	0021045A-00	RECEPTACLE ESSIEUX 4 DEG	-	-	1	-	-
4	0021046A-00	RECEPTACLE ESSIEUX 6 DEG	-	-	-	1	-
5	0021047A-00	RECEPTACLE ESSIEUX 8 DEG	-	-	-	-	1

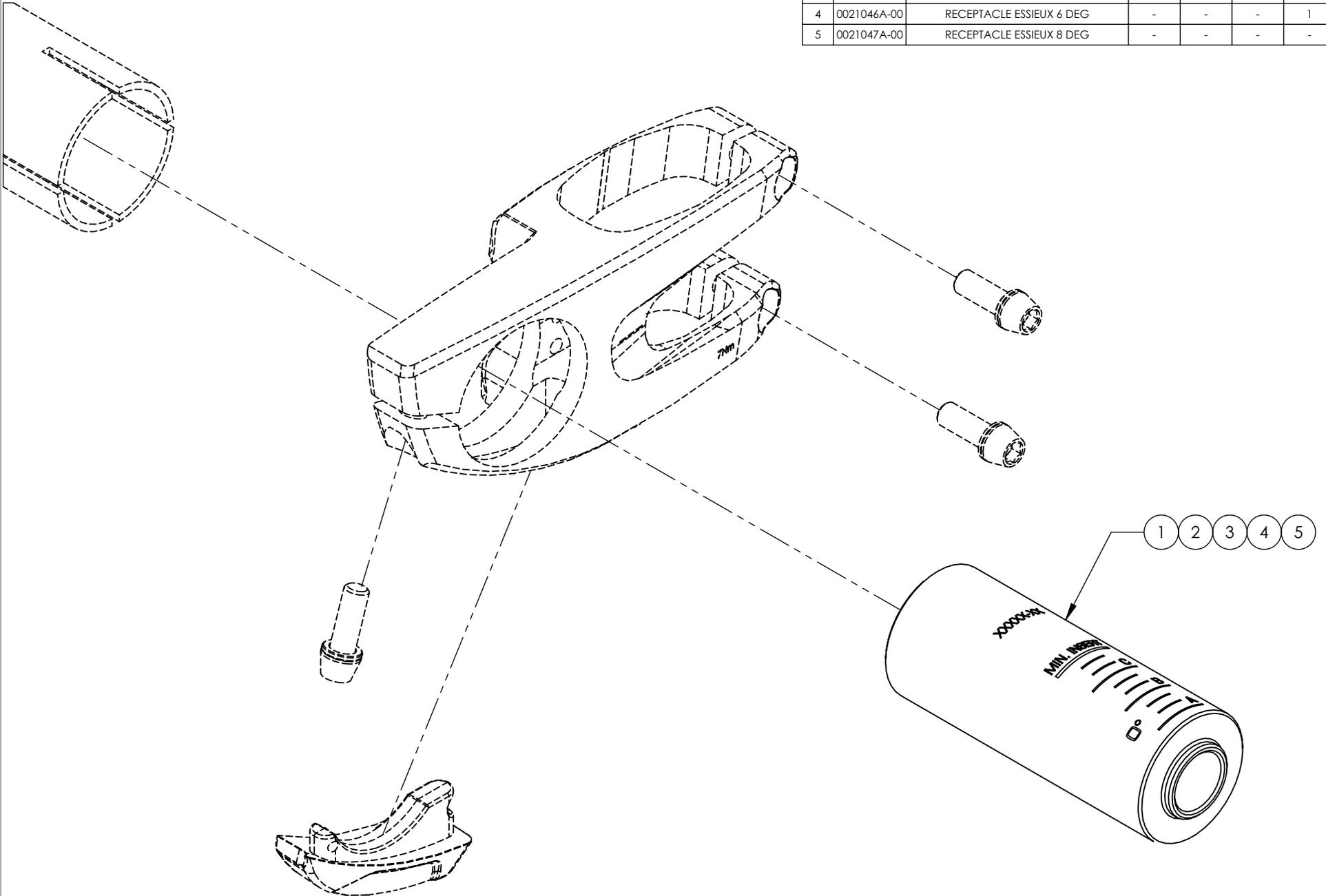

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

Catalogue de roues arrière
Insert anti-crevaison pour pneumatiques 1 3/8 po

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	9002409A-00	INSERT ANTI-CREVAISON & PNEUMATIQUE 1 3/8po, 22po	1
	0021371A-00	INSERT ANTI-CREVAISON 22x1 3/8po	1
	0021316A-00	PNEUS PNEUMATIQUE 22x1-3/8po	1
2	9002410A-00	INSERT ANTI-CREVAISON & PNEUMATIQUE 1 3/8po, 24po	1
	0021372A-00	INSERT ANTI-CREVAISON 24x1 3/8po	1
	0021317A-00	PNEUS PNEUMATIQUE 24x1-3/8po	1
3	9002412A-00	INSERT ANTI-CREVAISON & PNEUMATIQUE 1 3/8po, 26po	1
	0005466A-00	INSERT ANTI-CREVAISON 26x1 3/8po	1
	0021319A-00	PNEUS PNEUMATIQUE 26x1-3/8po	1

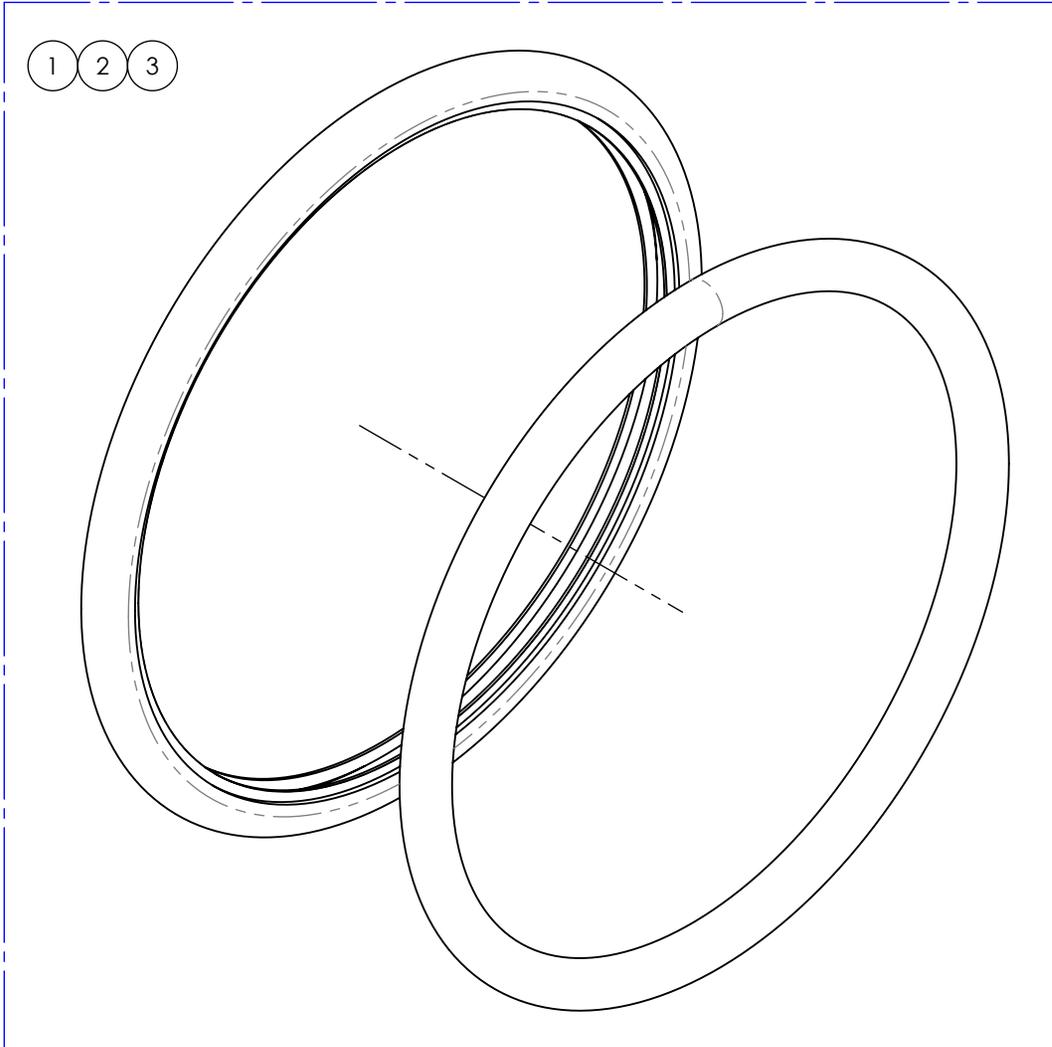

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

Catalogue de roues arrière Cerceaux de conduite Newton Air Grip



No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0021429A-00	CERCEAUX NEWTON AIR GRIP 20po NOIR	1
2	0021430A-00	CERCEAUX NEWTON AIR GRIP 22po NOIR	1
3	0021431A-00	CERCEAUX NEWTON AIR GRIP 24po NOIR	1
4	0021432A-00	CERCEAUX NEWTON AIR GRIP 25po NOIR	1
5	0021433A-00	CERCEAUX NEWTON AIR GRIP 26po NOIR	1
6	9002967A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 20po, ORANGE TANGERINE	1
7	9002968A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 22po, ORANGE TANGERINE	1
8	9002969A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 24po, ORANGE TANGERINE	1
9	9002970A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 25po, ORANGE TANGERINE	1
10	9002971A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 26po, ORANGE TANGERINE	1
11	9002972A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 20po, BLEU ACIER	1
12	9002973A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 22po, BLEU ACIER	1
13	9002974A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 24po, BLEU ACIER	1
14	9002975A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 25po, BLEU ACIER	1
15	9002976A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 26po, BLEU ACIER	1
16	9002977A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 20po, BLEU CIEL	1
17	9002978A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 22po, BLEU CIEL	1
18	9002979A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 24po, BLEU CIEL	1
19	9002980A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 25po, BLEU CIEL	1
20	9002981A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 26po, BLEU CIEL	1

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
21	9002982A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 20po, ANTHRACITE	1
22	9002983A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 22po, ANTHRACITE	1
23	9002984A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 24po, ANTHRACITE	1
24	9002985A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 25po, ANTHRACITE	1
25	9002986A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 26po, ANTHRACITE	1
26	9002987A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 20po, ROUGE FERRARI	1
27	9002988A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 22po, ROUGE FERRARI	1
28	9002989A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 24po, ROUGE FERRARI	1
29	9002990A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 25po, ROUGE FERRARI	1
30	9002991A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 26po, ROUGE FERRARI	1
31	9002992A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 20po, BLEU SAPHIRE	1
32	9002993A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 22po, BLEU SAPHIRE	1
33	9002994A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 24po, BLEU SAPHIRE	1
34	9002995A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 25po, BLEU SAPHIRE	1
35	9002996A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 26po, BLEU SAPHIRE	1
36	9002997A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 20po, BLANC	1
37	9002998A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 22po, BLANC	1
38	9002999A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 24po, BLANC	1
39	9003000A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 25po, BLANC	1
40	9003001A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 26po, BLANC	1
41	9003002A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 20po, BOURGOGNE	1
42	9003003A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 22po, BOURGOGNE	1
43	9003004A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 24po, BOURGOGNE	1
44	9003005A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 25po, BOURGOGNE	1
45	9003006A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 26po, BOURGOGNE	1
46	9003007A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 20po, VERT MONSTRE	1
47	9003008A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 22po, VERT MONSTRE	1
48	9003009A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 24po, VERT MONSTRE	1
49	9003010A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 25po, VERT MONSTRE	1
50	9003011A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 26po, VERT MONSTRE	1
51	9003012A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 20po, FUCHSIA	1
52	9003013A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 22po, FUCHSIA	1
53	9003014A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 24po, FUCHSIA	1
54	9003015A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 25po, FUCHSIA	1
55	9003016A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 26po, FUCHSIA	1
56	9003017A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 20po, VERT ACIDE	1
57	9003018A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 22po, VERT ACIDE	1
58	9003019A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 24po, VERT ACIDE	1
59	9003020A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 25po, VERT ACIDE	1
60	9003021A-00	CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 26po, VERT ACIDE	1



BLACK
NOIR



SUNKISSED ORANGE
ORANGE TANGERINE



STEEL BLUE
BLEU ACIER



SKY BLUE
BLEU CIEL



CHARCOAL
ANTHRACITE



FERRARI RED
ROUGE FERRARI



SAPPHIRE BLUE
BLEU SAPHIRE



WHITE
BLANC



BURGUNDY
BOURGOGNE



MONSTER GREEN
VERT MONSTRE



FUCHSIA



ACID GREEN
VERT ACIDE

COLLANTS POUR CERCEAUX

0051221A-00
COLLANT DE CONTACT POUR CERCEAUX
DE PROPULSION

FRAIS DE COUPE

Disponible seulement pour 20, 24, 25 & 26 po

9003632A-00

Découpe languette, assemblage rapprochée



9003633A-00

Découpe languette, assemblage très rapprochée



ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

Catalogue de roues arrière
Quincaillerie pour cerceaux de conduite

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	9001559A-00	QUINCAILLERIE - CERCEAU, NEWTON ONE	1
2	9001560A-00	QUINCAILLERIE - CERCEAU, NEWTON GRAVITY & SPINERGY	1
3	9001006A-00	QUINCAILLERIE - CERCEAU, MAG 20po	1
4	9001558A-00	QUINCAILLERIE - CERCEAU, MAG 22 & 24po	1
5	9008110A-00	QUINCAILLERIE V2 - CERCEAU, MAG 20po	1
6	9008111A-00	QUINCAILLERIE V2 - CERCEAU, MAG 22po	1
7	9008112A-00	QUINCAILLERIE V2 - CERCEAU, MAG 24po	1


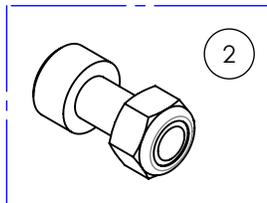
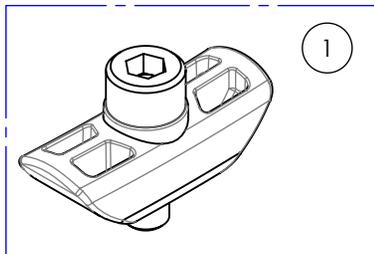


CHAQUE NUMÉRO D'ITEM EST POUR 1 ROUE COMPLÈTE.
BESOIN D'UNE QTÉ DE 2 POUR LES 2 ROUES

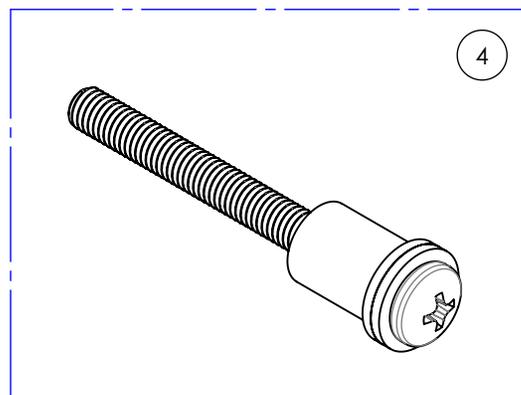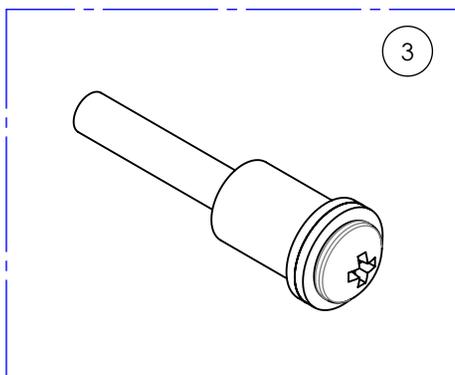


Compatible avec anciennes générations des roues mag

- 0021105A-00 - ROUE PLASTIQUE MOULÉ 20po
- 0021106A-00 - ROUE PLASTIQUE MOULÉ 22po
- 0021107A-00 - ROUE PLASTIQUE MOULÉ 24po

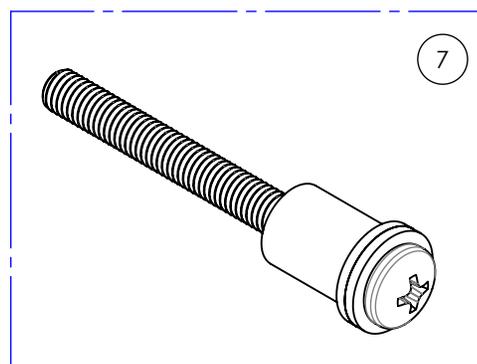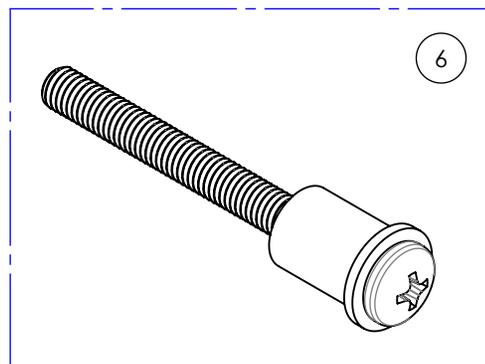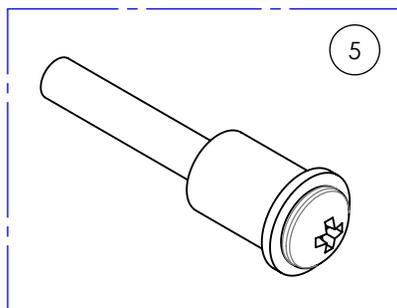

Compatible avec les plus récentes générations des roues mag


**Catalogue de roues arrière
Cerceaux Surge & Natural Fit**

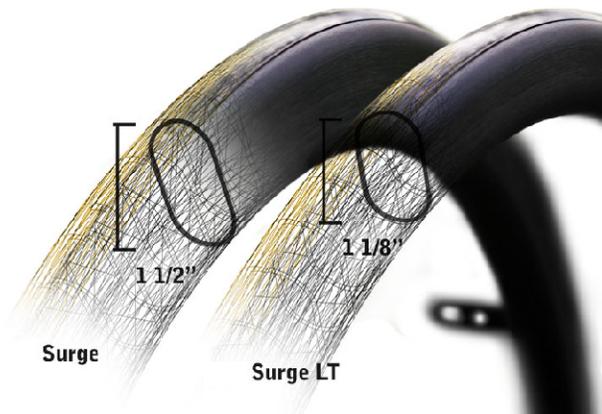

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0021239A-00	CERCEAUX SURGE 22po	1
2	0021240A-00	CERCEAUX SURGE 24po	1
3	0021241A-00	CERCEAUX SURGE 25po	1
4	0021242A-00	CERCEAUX SURGE 26po	1
5	0021232A-00	CERCEAUX SURGE LT 22po	1
6	0021233A-00	CERCEAUX SURGE LT 24po	1
7	0021234A-00	CERCEAUX SURGE LT 25po	1
8	0021235A-00	CERCEAUX SURGE LT 26po	1
9	0021221A-00	CERCEAUX NATURAL FIT 22po	1
10	0021222A-00	CERCEAUX NATURAL FIT 24po	1
11	0021223A-00	CERCEAUX NATURAL FIT 25po	1
12	0021224A-00	CERCEAUX NATURAL FIT 26po	1
13	9001552A-00	CERCEAU - NATURAL FIT, STD GRIP, 22po	1
	0021221A-00	CERCEAUX NATURAL FIT 22po	1
	0021226A-00	PROTÈGE POUCE NATURAL FIT 22po	1
14	9001553A-00	CERCEAU - NATURAL FIT, STD GRIP, 24po	1
	0021222A-00	CERCEAUX NATURAL FIT 24po	1
	0021227A-00	PROTÈGE POUCE NATURAL FIT 24po	1
15	9002849A-00	CERCEAU - NATURAL FIT, STD GRIP, 25po	1
	0021223A-00	CERCEAUX NATURAL FIT 25po	1
	0021228A-00	PROTÈGE POUCE NATURAL FIT 25po	1
16	9001554A-00	CERCEAU - NATURAL FIT, STD GRIP, 26po	1
	0021224A-00	CERCEAUX NATURAL FIT 26po	1
	0021229A-00	PROTÈGE POUCE NATURAL FIT 26po	1
17	9003278A-00	CERCEAU - NATURAL FIT SUPER GRIP, 22po	1
	0021221A-00	CERCEAUX NATURAL FIT 22po	1
	0021243A-00	PROTÈGE POUCE SUPER GRIP NATURAL FIT 22po	1
18	9003279A-00	CERCEAU - NATURAL FIT SUPER GRIP, 24po	1
	0021222A-00	CERCEAUX NATURAL FIT 24po	1
	0021244A-00	PROTÈGE POUCE SUPER GRIP NATURAL FIT 24po	1
19	9003280A-00	CERCEAU - NATURAL FIT SUPER GRIP, 25po	1
	0021223A-00	CERCEAUX NATURAL FIT 25po	1
	0021245A-00	PROTÈGE POUCE SUPER GRIP NATURAL FIT 25po	1



No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
20	9003281A-00	CERCEAU - NATURAL FIT SUPER GRIP, 26po	1
	0021224A-00	CERCEAUX NATURAL FIT 26po	1
	0021246A-00	PROTÈGE POUCE SUPER GRIP NATURAL FIT 26po	1
21	0021272A-00	CERCEAUX NATURAL FIT LT 22po	1
22	0021273A-00	CERCEAUX NATURAL FIT LT 24po	1
23	0021274A-00	CERCEAUX NATURAL FIT LT 25po	1
24	0021275A-00	CERCEAUX NATURAL FIT LT 26po	1
25	9003282A-00	CERCEAU - NATURAL FIT LT STD GRIP, 22po	1
	0021272A-00	CERCEAUX NATURAL FIT LT 22po	1
	0021226A-00	PROTÈGE POUCE NATURAL FIT 22po	1
26	9003283A-00	CERCEAU - NATURAL FIT LT STD GRIP, 24po	1
	0021273A-00	CERCEAUX NATURAL FIT LT 24po	1
	0021227A-00	PROTÈGE POUCE NATURAL FIT 24po	1
27	9003284A-00	CERCEAU - NATURAL FIT LT STD GRIP, 25po	1
	0021274A-00	CERCEAUX NATURAL FIT LT 25po	1
	0021228A-00	PROTÈGE POUCE NATURAL FIT 25po	1
28	9003285A-00	CERCEAU - NATURAL FIT LT STD GRIP, 26po	1
	0021275A-00	CERCEAUX NATURAL FIT LT 26po	1
	0021229A-00	PROTÈGE POUCE NATURAL FIT 26po	1
29	9007803A-00	CERCEAU - NATURAL FIT LT, SUPER GRIP, 22po	1
	0021243A-00	PROTÈGE POUCE SUPER GRIP NATURAL FIT 22po	1
	0021272A-00	CERCEAUX NATURAL FIT LT 22po	1
30	9007804A-00	CERCEAU - NATURAL FIT LT, SUPER GRIP, 24po	1
	0021244A-00	PROTÈGE POUCE SUPER GRIP NATURAL FIT 24po	1
	0021273A-00	CERCEAUX NATURAL FIT LT 24po	1
31	9007805A-00	CERCEAU - NATURAL FIT LT, SUPER GRIP, 25po	1
	0021245A-00	PROTÈGE POUCE SUPER GRIP NATURAL FIT 25po	1
	0021274A-00	CERCEAUX NATURAL FIT LT 25po	1
32	9007806A-00	CERCEAU - NATURAL FIT LT, SUPER GRIP, 26po	1
	0021246A-00	PROTÈGE POUCE SUPER GRIP NATURAL FIT 26po	1
	0021275A-00	CERCEAUX NATURAL FIT LT 26po	1

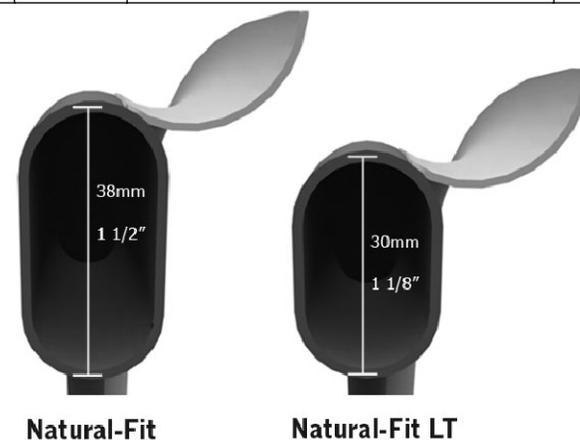

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


OPTIONS CERCEAUX DE CONDUITE

Pour cerceaux aluminium seulement (0021200A-00 to 0021204A-00)

1. Assemblage standard (Languette longue)
2. Assemblage rapproché (Languette courte 2 positions)
3. Assemblage très rapproché (Languette courte 1 position)

COLLANTS POUR CERCEAUX

9003634A-00

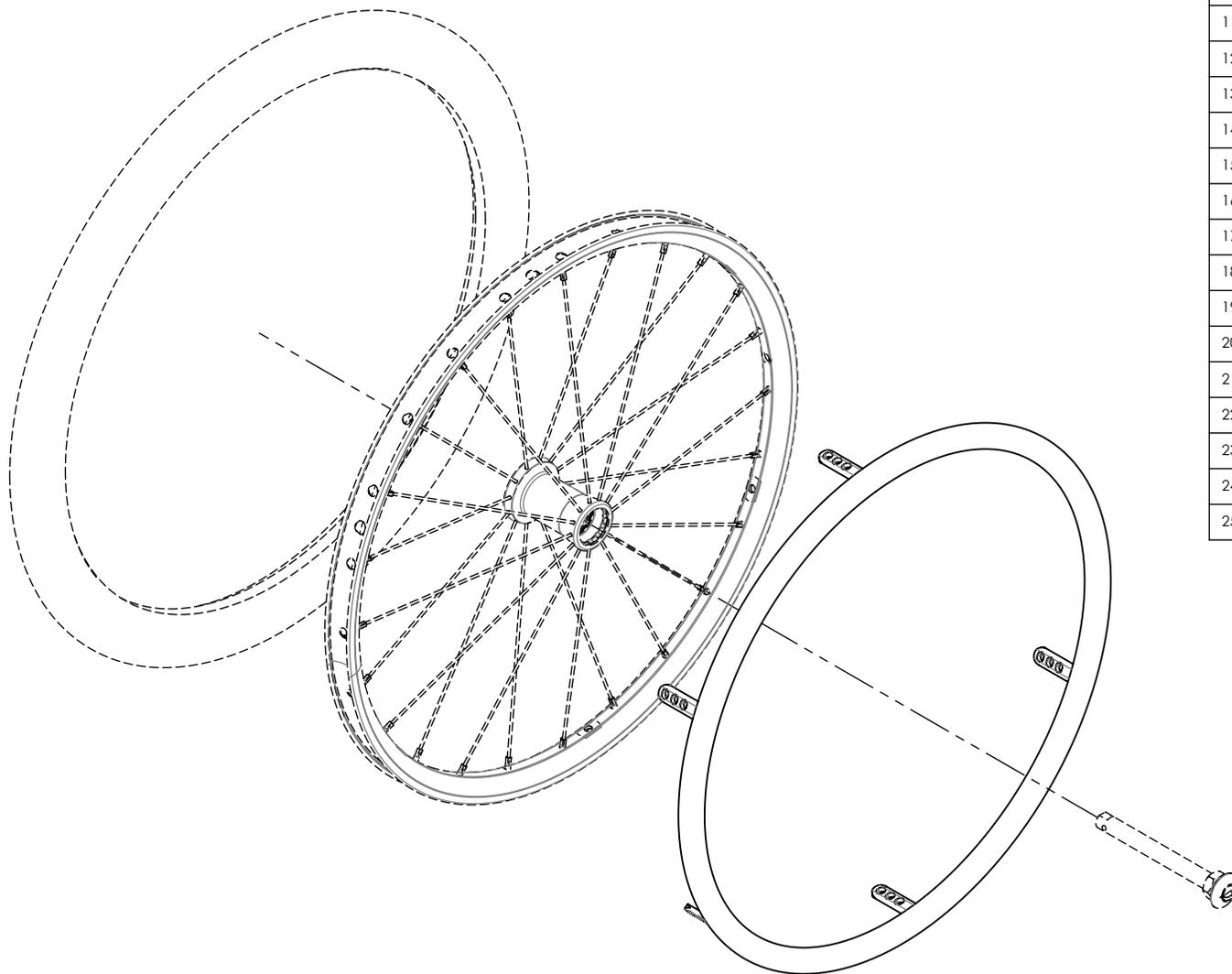


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	Qté
1	0021236A-00	CERCEAUX ALUMINIUM 20po / ROUE PLASTIQUE	1
2	0021205A-00	CERCEAUX ALUMINIUM 22po / ROUE PLASTIQUE	1
3	0021206A-00	CERCEAUX ALUMINIUM 24po / ROUE PLASTIQUE	1
4	0021237A-00	CERCEAUX PLASTIFIÉS 20po / ROUE PLASTIQUE	1
5	0021207A-00	CERCEAUX PLASTIFIÉS 22po - ROUE PLASTIQUE	1
6	0021208A-00	CERCEAUX PLASTIFIÉS 24po - ROUE PLASTIQUE	1
7	0021200A-00	CERCEAUX ALUMINIUM 20po	1
8	0021201A-00	CERCEAUX ALUMINIUM 22po	1
9	0021202A-00	CERCEAUX ALUMINIUM 24po	1
10	0021203A-00	CERCEAUX ALUMINIUM 25po	1
11	0021204A-00	CERCEAUX ALUMINIUM 26po	1
12	0021100A-00	CERCEAUX ALU ANOD. DURE 20po NOIR	1
13	0021100A-01	CERCEAUX ALU ANOD. DURE 22po NOIR	1
14	0021100A-02	CERCEAUX ALU ANOD. DURE 24po NOIR	1
15	0021100A-03	CERCEAUX ALU ANOD. DURE 25po NOIR	1
16	0021100A-04	CERCEAUX ALU ANOD. DURE 26po NOIR	1
17	0021210A-00	CERCEAUX PLASTIFIÉS 20po	1
18	0021211A-00	CERCEAUX PLASTIFIÉS 22po	1
19	0021212A-00	CERCEAUX PLASTIFIÉS 24po	1
20	0021213A-00	CERCEAUX PLASTIFIÉS 25po	1
21	0021214A-00	CERCEAUX PLASTIFIÉS 26po	1
22	0021216A-00	CERCEAUX ANTIDÉRAPANTS 22po	1
23	0021217A-00	CERCEAUX ANTIDÉRAPANTS 24po	1
24	0021218A-00	CERCEAUX ANTIDÉRAPANTS 25po	1
25	0021219A-00	CERCEAUX ANTIDÉRAPANTS 26po	1

Catalogue de roues arrière
Tube de montage de roues arrière

* NOTE: VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE A LA CLIENTÈLE AVANT DE COMMANDER LE TUBE DE MONTAGE DE ROUES ARRIÈRE (#9010381 A #9010382)

LES ARTICLES DOIVENT ÊTRE FABRIQUÉ PAR MOTION COMPOSITES SELON LES SPÉCIFICATIONS DU FAUTEUIL.
(ASSUREZ-VOUS D'AVOIR LE NUMÉRO DE SÉRIE DU FAUTEUIL)



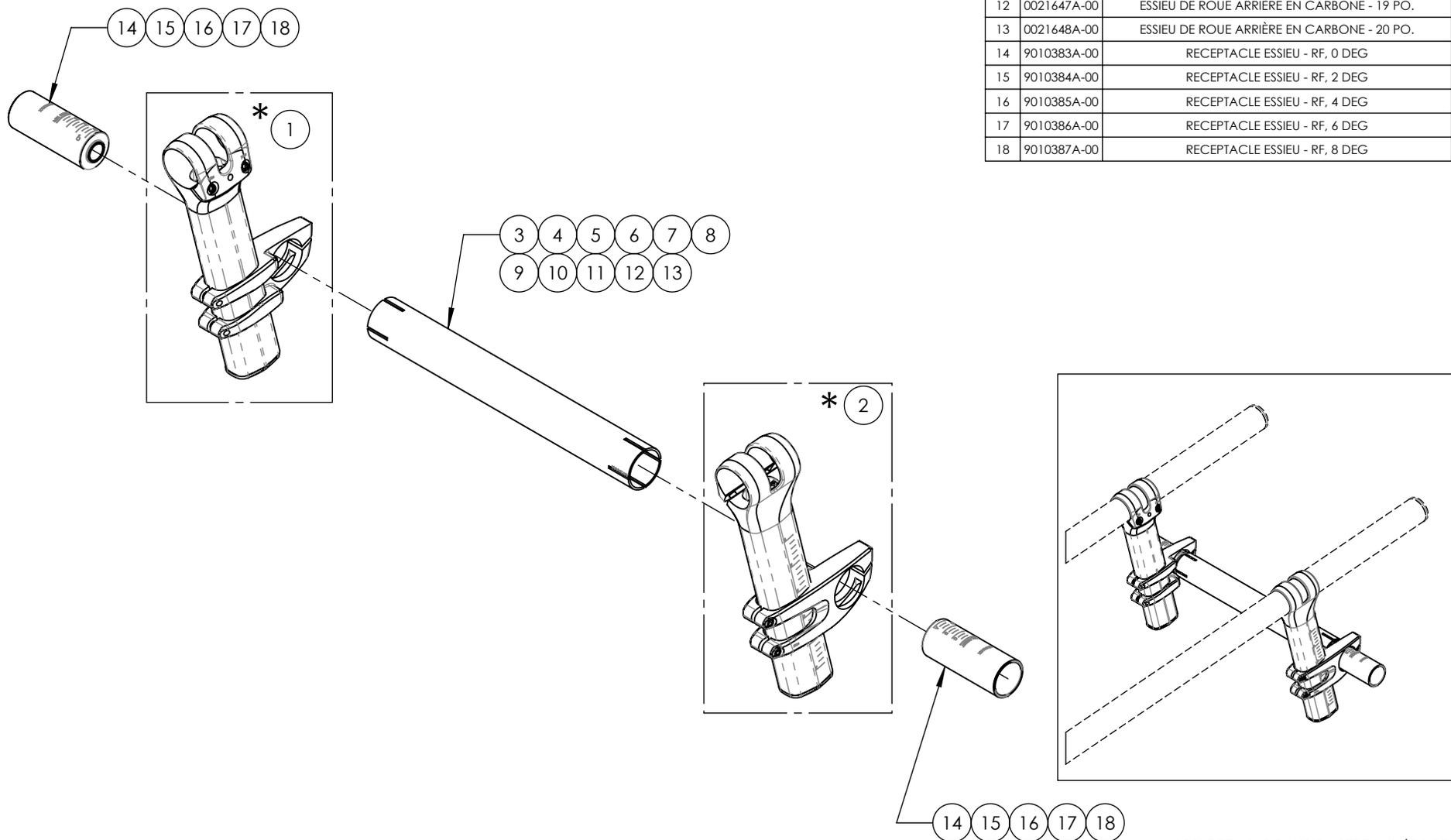


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1*	9010381A-00	TUBE DE MONTAGE - STD, DROITE	1
2*	9010382A-00	TUBE DE MONTAGE - STD, GAUCHE	1
3	0021638A-00	ESSIEU DE ROUE ARRIÈRE EN CARBONE - 10 PO.	1
4	0021639A-00	ESSIEU DE ROUE ARRIÈRE EN CARBONE - 11 PO.	1
5	0021640A-00	ESSIEU DE ROUE ARRIÈRE EN CARBONE - 12 PO.	1
6	0021641A-00	ESSIEU DE ROUE ARRIÈRE EN CARBONE - 13 PO.	1
7	0021642A-00	ESSIEU DE ROUE ARRIÈRE EN CARBONE - 14 PO.	1
8	0021643A-00	ESSIEU DE ROUE ARRIÈRE EN CARBONE - 15 PO.	1
9	0021644A-00	ESSIEU DE ROUE ARRIÈRE EN CARBONE - 16 PO.	1
10	0021645A-00	ESSIEU DE ROUE ARRIÈRE EN CARBONE - 17 PO.	1
11	0021646A-00	ESSIEU DE ROUE ARRIÈRE EN CARBONE - 18 PO.	1
12	0021647A-00	ESSIEU DE ROUE ARRIÈRE EN CARBONE - 19 PO.	1
13	0021648A-00	ESSIEU DE ROUE ARRIÈRE EN CARBONE - 20 PO.	1
14	9010383A-00	RECEPTACLE ESSIEU - RF, 0 DEG	2
15	9010384A-00	RECEPTACLE ESSIEU - RF, 2 DEG	2
16	9010385A-00	RECEPTACLE ESSIEU - RF, 4 DEG	2
17	9010386A-00	RECEPTACLE ESSIEU - RF, 6 DEG	2
18	9010387A-00	RECEPTACLE ESSIEU - RF, 8 DEG	2



ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

Catalogue de roues arrière
Essieux à dégagement rapide et permanent

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0021014A-00	ESSIEUX À DÉGAGEMENT RAPIDE	1
2	0021015A-00	ESSIEUX À DÉGAGEMENT RAPIDE QUAD	1
3	9002956A-00	ESSIEU - FILLETÉ	1
4	9001562A-00	ESSIEU - FILLETÉ POUR ROUE MAG	1
5	9002896A-00	ESSIEU - À DÉGAGEMENT RAPIDE, POUR ROUE SPINERGY	1
6	9002897A-00	ESSIEU - POUR QUADRAPLÉGIQUE, POUR ROUE SPINERGY	1

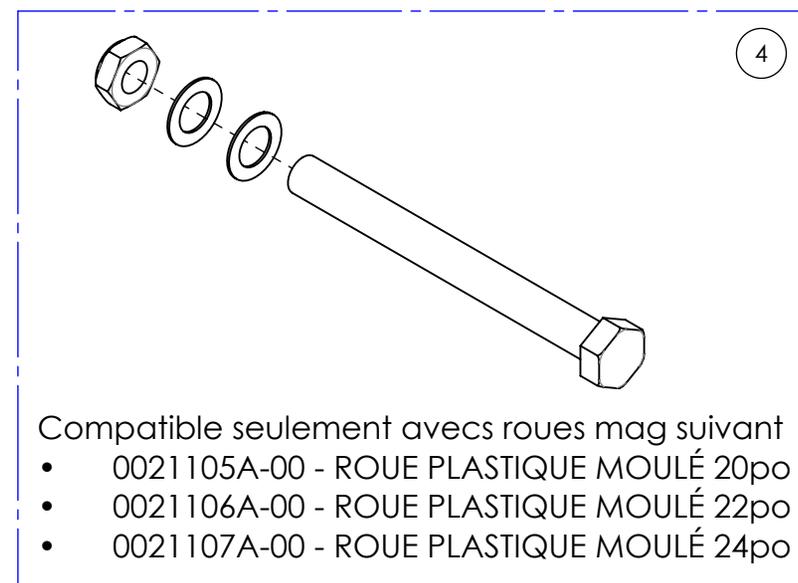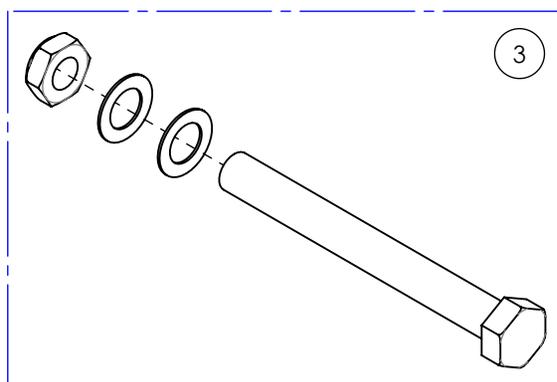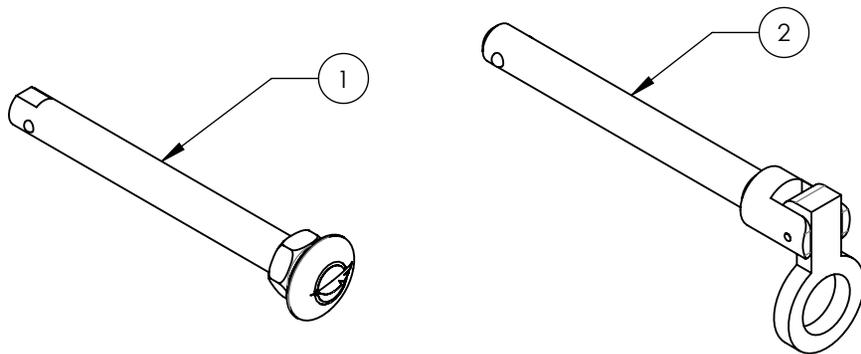

POUR ROUES SPINERGY SPOX & LX SEULEMENT

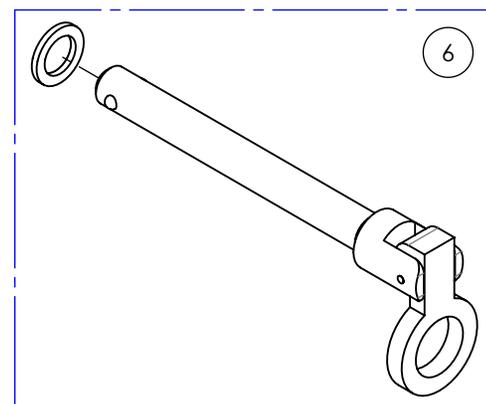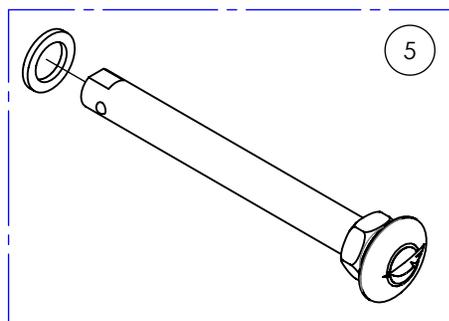



LX, XLX, SLX, XSLX Replacement Spokes

Item#	Spinergy Part#	Wheel Size	Color	Type	Assigned wheel
0021737A-00	511005-9.50PUR	24in	PURPLE	PBO spoke, 4mm thick	24" LX, SLX both sides. 24" XLX, XSLX (X-Laced) inside
0021738A-00	511005-9.84BLA	25in	BLACK	PBO spoke, 4mm thick	25" LX both sides. 25" XLX (X-Laced) inside
0021739A-00	511005-9.84BLU	25in	BLUE	PBO spoke, 4mm thick	25" LX both sides. 25" XLX (X-Laced) inside
0021740A-00	511005-9.84RED	25in	RED	PBO spoke, 4mm thick	25" LX both sides. 25" XLX (X-Laced) inside
0021741A-00	511005-9.84YEL	25in	YELLOW	PBO spoke, 4mm thick	25" LX both sides. 25" XLX (X-Laced) inside
0021742A-00	511005-9.84WHI	25in	WHITE	PBO spoke, 4mm thick	25" LX both sides. 25" XLX (X-Laced) inside
0021743A-00	511005-9.84ORA	25in	ORANGE	PBO spoke, 4mm thick	25" LX both sides. 25" XLX (X-Laced) inside
0021744A-00	511005-9.84GRE	25in	GREEN	PBO spoke, 4mm thick	25" LX both sides. 25" XLX (X-Laced) inside
0021745A-00	511005-9.84PNK	25in	PINK	PBO spoke, 4mm thick	25" LX both sides. 25" XLX (X-Laced) inside
0021746A-00	511005-9.84PUR	25in	PURPLE	PBO spoke, 4mm thick	25" LX both sides. 25" XLX (X-Laced) inside
0021747A-00	511005-10.47BLA	26in	BLACK	PBO spoke, 4mm thick	26" LX both sides. 26" XLX (X-Laced) inside
0021748A-00	511005-10.47BLU	26in	BLUE	PBO spoke, 4mm thick	26" LX both sides. 26" XLX (X-Laced) inside
0021749A-00	511005-10.47RED	26in	RED	PBO spoke, 4mm thick	26" LX both sides. 26" XLX (X-Laced) inside
0021750A-00	511005-10.47YEL	26in	YELLOW	PBO spoke, 4mm thick	26" LX both sides. 26" XLX (X-Laced) inside
0021751A-00	511005-10.47WHI	26in	WHITE	PBO spoke, 4mm thick	26" LX both sides. 26" XLX (X-Laced) inside
0021752A-00	511005-10.47ORA	26in	ORANGE	PBO spoke, 4mm thick	26" LX both sides. 26" XLX (X-Laced) inside
0021753A-00	511005-10.47GRE	26in	GREEN	PBO spoke, 4mm thick	26" LX both sides. 26" XLX (X-Laced) inside
0021754A-00	511005-10.47PNK	26in	PINK	PBO spoke, 4mm thick	26" LX both sides. 26" XLX (X-Laced) inside
0021755A-00	511005-10.47PUR	26in	PURPLE	PBO spoke, 4mm thick	26" LX both sides. 26" XLX (X-Laced) inside



Blade LXL & CLX Replacement Spokes (Blade)					
Item#	Part#	Wheel Size	Color	Type	Assigned wheel
0021756A-00	511004.B.7.95BLACK	20in	BLACK	BLADE PBO Spoke	20" BLADE LXL inside
0021757A-00	511004.B.7.95BLU	20in	BLUE	BLADE PBO Spoke	20" BLADE LXL inside
0021758A-00	511004.B.7.95RED	20in	RED	BLADE PBO Spoke	20" BLADE LXL inside
0021759A-00	511004.B.7.95YELLOW	20in	YELLOW	BLADE PBO Spoke	20" BLADE LXL inside
0021760A-00	511004.B.7.95WHITE	20in	WHITE	BLADE PBO Spoke	20" BLADE LXL inside
0021761A-00	511004.B.7.95ORANGE	20in	ORANGE	BLADE PBO Spoke	20" BLADE LXL inside
0021762A-00	511004.B.7.95GREEN	20in	GREEN	BLADE PBO Spoke	20" BLADE LXL inside
0021763A-00	511004.B.7.95PINK	20in	PINK	BLADE PBO Spoke	20" BLADE LXL inside
0021764A-00	511004.B.7.95PURPLE	20in	PURPLE	BLADE PBO Spoke	20" BLADE LXL inside
0021765A-00	511004.B.8.05BLACK	20in	BLACK	BLADE PBO Spoke	20" BLADE LXL outside
0021766A-00	511004.B.8.05BLUE	20in	BLUE	BLADE PBO Spoke	20" BLADE LXL outside
0021767A-00	511004.B.8.05RED	20in	RED	BLADE PBO Spoke	20" BLADE LXL outside
0021768A-00	511004.B.8.05YELLOW	20in	YELLOW	BLADE PBO Spoke	20" BLADE LXL outside
0021769A-00	511004.B.8.05WHITE	20in	WHITE	BLADE PBO Spoke	20" BLADE LXL outside
0021770A-00	511004.B.8.05ORANGE	20in	ORANGE	BLADE PBO Spoke	20" BLADE LXL outside
0021771A-00	511004.B.8.05GREEN	20in	GREEN	BLADE PBO Spoke	20" BLADE LXL outside
0021772A-00	511004.B.8.05PINK	20in	PINK	BLADE PBO Spoke	20" BLADE LXL outside
0021773A-00	511004.B.8.05PURPLE	20in	PURPLE	BLADE PBO Spoke	20" BLADE LXL outside
0021774A-00	511004.B.8.90BLACK	22in	BLACK	BLADE PBO Spoke	22" BLADE LXL inside
0021775A-00	511004.B.8.90BLUE	22in	BLUE	BLADE PBO Spoke	22" BLADE LXL inside
0021776A-00	511004.B.8.90RED	22in	RED	BLADE PBO Spoke	22" BLADE LXL inside
0021777A-00	511004.B.8.90YELLOW	22in	YELLOW	BLADE PBO Spoke	22" BLADE LXL inside
0021778A-00	511004.B.8.90WHITE	22in	WHITE	BLADE PBO Spoke	22" BLADE LXL inside
0021779A-00	511004.B.8.90ORANGE	22in	ORANGE	BLADE PBO Spoke	22" BLADE LXL inside
0021780A-00	511004.B.8.90GREEN	22in	GREEN	BLADE PBO Spoke	22" BLADE LXL inside
0021781A-00	511004.B.8.90PINK	22in	PINK	BLADE PBO Spoke	22" BLADE LXL inside
0021782A-00	511004.B.8.90PURPLE	22in	PURPLE	BLADE PBO Spoke	22" BLADE LXL inside
0021783A-00	511004.B.9.05BLACK	22in	BLACK	BLADE PBO Spoke	22" BLADE LXL outside



Blade LXL & CLX Replacement Spokes (Blade)

Item#	Part#	Wheel Size	Color	Type	Assigned wheel
0021784A-00	511004.B.9.05BLUE	22in	BLUE	BLADE PBO Spoke	22" BLADE LXL outside
0021785A-00	511004.B.9.05RED	22in	RED	BLADE PBO Spoke	22" BLADE LXL outside
0021786A-00	511004.B.9.05YELLOW	22in	YELLOW	BLADE PBO Spoke	22" BLADE LXL outside
0021787A-00	511004.B.9.05WHITE	22in	WHITE	BLADE PBO Spoke	22" BLADE LXL outside
0021788A-00	511004.B.9.05ORANGE	22in	ORANGE	BLADE PBO Spoke	22" BLADE LXL outside
0021789A-00	511004.B.9.05GREEN	22in	GREEN	BLADE PBO Spoke	22" BLADE LXL outside
0021790A-00	511004.B.9.05PINK	22in	PINK	BLADE PBO Spoke	22" BLADE LXL outside
0021791A-00	511004.B.9.05PURPLE	22in	PURPLE	BLADE PBO Spoke	22" BLADE LXL outside
0021792A-00	511004.B.9.70BLACK	24in	BLACK	BLADE PBO Spoke	24" BLADE LXL inside
0021793A-00	511004.B.9.70BLU	24in	BLUE	BLADE PBO Spoke	24" BLADE LXL inside
0021794A-00	511004.B.9.70RED	24in	RED	BLADE PBO Spoke	24" BLADE LXL inside
0021795A-00	511004.B.9.70YELLOW	24in	YELLOW	BLADE PBO Spoke	24" BLADE LXL inside
0021796A-00	511004.B.9.70WHITE	24in	WHITE	BLADE PBO Spoke	24" BLADE LXL inside
0021797A-00	511004.B.9.70ORANGE	24in	ORANGE	BLADE PBO Spoke	24" BLADE LXL inside
0021798A-00	511004.B.9.70GREEN	24in	GREEN	BLADE PBO Spoke	24" BLADE LXL inside
0021799A-00	511004.B.9.70PINK	24in	PINK	BLADE PBO Spoke	24" BLADE LXL inside
0021800A-00	511004.B.9.70PURPLE	24in	PURPLE	BLADE PBO Spoke	24" BLADE LXL inside
0021801A-00	511004.B.9.80BLACK	24in	BLACK	BLADE PBO Spoke	24" BLADE LXL outside
0021802A-00	511004.B.9.80BLUE	24in	BLUE	BLADE PBO Spoke	24" BLADE LXL outside
0021803A-00	511004.B.9.80RED	24in	RED	BLADE PBO Spoke	24" BLADE LXL outside
0021804A-00	511004.B.9.80YELLOW	24in	YELLOW	BLADE PBO Spoke	24" BLADE LXL outside
0021805A-00	511004.B.9.80WHITE	24in	WHITE	BLADE PBO Spoke	24" BLADE LXL outside
0021806A-00	511004.B.9.80ORANGE	24in	ORANGE	BLADE PBO Spoke	24" BLADE LXL outside
0021807A-00	511004.B.9.80GREEN	24in	GREEN	BLADE PBO Spoke	24" BLADE LXL outside
0021808A-00	511004.B.9.80PINK	24in	PINK	BLADE PBO Spoke	24" BLADE LXL outside
0021809A-00	511004.B.9.80PURPLE	24in	PURPLE	BLADE PBO Spoke	24" BLADE LXL outside
0021810A-00	511004.B.10.10BLACK	25in	BLACK	BLADE PBO Spoke	25" BLADE LXL inside
0021811A-00	511004.B.10.10BLUE	25in	BLUE	BLADE PBO Spoke	25" BLADE LXL inside
0021812A-00	511004.B.10.10RED	25in	RED	BLADE PBO Spoke	25" BLADE LXL inside
0021813A-00	511004.B.10.10YELLOW	25in	YELLOW	BLADE PBO Spoke	25" BLADE LXL inside



Blade LXL & CLX Replacement Spokes (Blade)


Item#	Part#	Wheel Size	Color	Type	Assigned wheel
0021814A-00	511004.B.10.10WHITE	25in	WHITE	BLADE PBO Spoke	25" BLADE LXL inside
0021815A-00	511004.B.10.10ORANGE	25in	ORANGE	BLADE PBO Spoke	25" BLADE LXL inside
0021816A-00	511004.B.10.10GREEN	25in	GREEN	BLADE PBO Spoke	25" BLADE LXL inside
0021817A-00	511004.B.10.10PINK	25in	PINK	BLADE PBO Spoke	25" BLADE LXL inside
0021818A-00	511004.B.10.10PURPLE	25in	PURPLE	BLADE PBO Spoke	25" BLADE LXL inside
0021819A-00	511004.B.10.20BLACK	25in	BLACK	BLADE PBO Spoke	25" BLADE LXL outside
0021820A-00	511004.B.10.20BLUE	25in	BLUE	BLADE PBO Spoke	25" BLADE LXL outside
0021821A-00	511004.B.10.20RED	25in	RED	BLADE PBO Spoke	25" BLADE LXL outside
0021822A-00	511004.B.10.20YELLOW	25in	YELLOW	BLADE PBO Spoke	25" BLADE LXL outside
0021823A-00	511004.B.10.20WHITE	25in	WHITE	BLADE PBO Spoke	25" BLADE LXL outside
0021824A-00	511004.B.10.20ORANGE	25in	ORANGE	BLADE PBO Spoke	25" BLADE LXL outside
0021825A-00	511004.B.10.20GREEN	25in	GREEN	BLADE PBO Spoke	25" BLADE LXL outside
0021826A-00	511004.B.10.20PINK	25in	PINK	BLADE PBO Spoke	25" BLADE LXL outside
0021827A-00	511004.B.10.20PURPLE	25in	PURPLE	BLADE PBO Spoke	25" BLADE LXL outside
0021828A-00	511004.B.10.70BLACK	26in	BLACK	BLADE PBO Spoke	26" BLADE LXL inside
0021829A-00	511004.B.10.70BLUE	26in	BLUE	BLADE PBO Spoke	26" BLADE LXL inside
0021830A-00	511004.B.10.70RED	26in	RED	BLADE PBO Spoke	26" BLADE LXL inside
0021831A-00	511004.B.10.70YELLOW	26in	YELLOW	BLADE PBO Spoke	26" BLADE LXL inside
0021832A-00	511004.B.10.70WHITE	26in	WHITE	BLADE PBO Spoke	26" BLADE LXL inside
0021833A-00	511004.B.10.70ORANGE	26in	ORANGE	BLADE PBO Spoke	26" BLADE LXL inside
0021834A-00	511004.B.10.70GREEN	26in	GREEN	BLADE PBO Spoke	26" BLADE LXL inside
0021835A-00	511004.B.10.70PINK	26in	PINK	BLADE PBO Spoke	26" BLADE LXL inside
0021836A-00	511004.B.10.70PURPLE	26in	PURPLE	BLADE PBO Spoke	26" BLADE LXL inside
0021837A-00	511004.B.10.80BLACK	26in	BLACK	BLADE PBO Spoke	26" BLADE LXL outside
0021838A-00	511004.B.10.80BLUE	26in	BLUE	BLADE PBO Spoke	26" BLADE LXL outside
0021839A-00	511004.B.10.80RED	26in	RED	BLADE PBO Spoke	26" BLADE LXL outside
0021840A-00	511004.B.10.80YELLOW	26in	YELLOW	BLADE PBO Spoke	26" BLADE LXL outside
0021841A-00	511004.B.10.80WHITE	26in	WHITE	BLADE PBO Spoke	26" BLADE LXL outside
0021842A-00	511004.B.10.80ORANGE	26in	ORANGE	BLADE PBO Spoke	26" BLADE LXL outside
0021843A-00	511004.B.10.80GREEN	26in	GREEN	BLADE PBO Spoke	26" BLADE LXL outside
0021844A-00	511004.B.10.80PINK	26in	PINK	BLADE PBO Spoke	26" BLADE LXL outside
0021845A-00	511004.B.10.80PURPLE	26in	PURPLE	BLADE PBO Spoke	26" BLADE LXL outside



LX, XLX, SLX, XSLX Replacement Spokes

Item#	Spinergy Part#	Wheel Size	Color	Type	Assigned wheel
0021720A-00	511005-8.75BLA	22in	BLACK	PBO spoke, 4mm thick	22" LX both sides. 22" XLX (X-Laced) inside
0021721A-00	511005-8.75BLU	22in	BLUE	PBO spoke, 4mm thick	22" LX both sides. 22" XLX (X-Laced) inside
0021722A-00	511005-8.75RED	22in	RED	PBO spoke, 4mm thick	22" LX both sides. 22" XLX (X-Laced) inside
0021723A-00	511005-8.75YEL	22in	YELLOW	PBO spoke, 4mm thick	22" LX both sides. 22" XLX (X-Laced) inside
0021724A-00	511005-8.75WHI	22in	WHITE	PBO spoke, 4mm thick	22" LX both sides. 22" XLX (X-Laced) inside
0021725A-00	511005-8.75ORA	22in	ORANGE	PBO spoke, 4mm thick	22" LX both sides. 22" XLX (X-Laced) inside
0021726A-00	511005-8.75GRE	22in	GREEN	PBO spoke, 4mm thick	22" LX both sides. 22" XLX (X-Laced) inside
0021727A-00	511005-8.75PNK	22in	PINK	PBO spoke, 4mm thick	22" LX both sides. 22" XLX (X-Laced) inside
0021728A-00	511005-8.75PUR	22in	PURPLE	PBO spoke, 4mm thick	22" LX both sides. 22" XLX (X-Laced) inside
0021729A-00	511005-9.50BLA	24in	BLACK	PBO spoke, 4mm thick	24" LX, SLX both sides. 24" XLX, XSLX (X-Laced) inside
0021730A-00	511005-9.50BLU	24in	BLUE	PBO spoke, 4mm thick	24" LX, SLX both sides. 24" XLX, XSLX (X-Laced) inside
0021731A-00	511005-9.50RED	24in	RED	PBO spoke, 4mm thick	24" LX, SLX both sides. 24" XLX, XSLX (X-Laced) inside
0021732A-00	511005-9.50YEL	24in	YELLOW	PBO spoke, 4mm thick	24" LX, SLX both sides. 24" XLX, XSLX (X-Laced) inside
0021733A-00	511005-9.50WHI	24in	WHITE	PBO spoke, 4mm thick	24" LX, SLX both sides. 24" XLX, XSLX (X-Laced) inside
0021734A-00	511005-9.50ORA	24in	ORANGE	PBO spoke, 4mm thick	24" LX, SLX both sides. 24" XLX, XSLX (X-Laced) inside
0021735A-00	511005-9.50GRE	24in	GREEN	PBO spoke, 4mm thick	24" LX, SLX both sides. 24" XLX, XSLX (X-Laced) inside
0021738A-00	511005-9.50PNK	24in	PINK	PBO spoke, 4mm thick	24" LX, SLX both sides. 24" XLX, XSLX (X-Laced) inside

Catalogue de roues arrière
Roues arrières & rayons

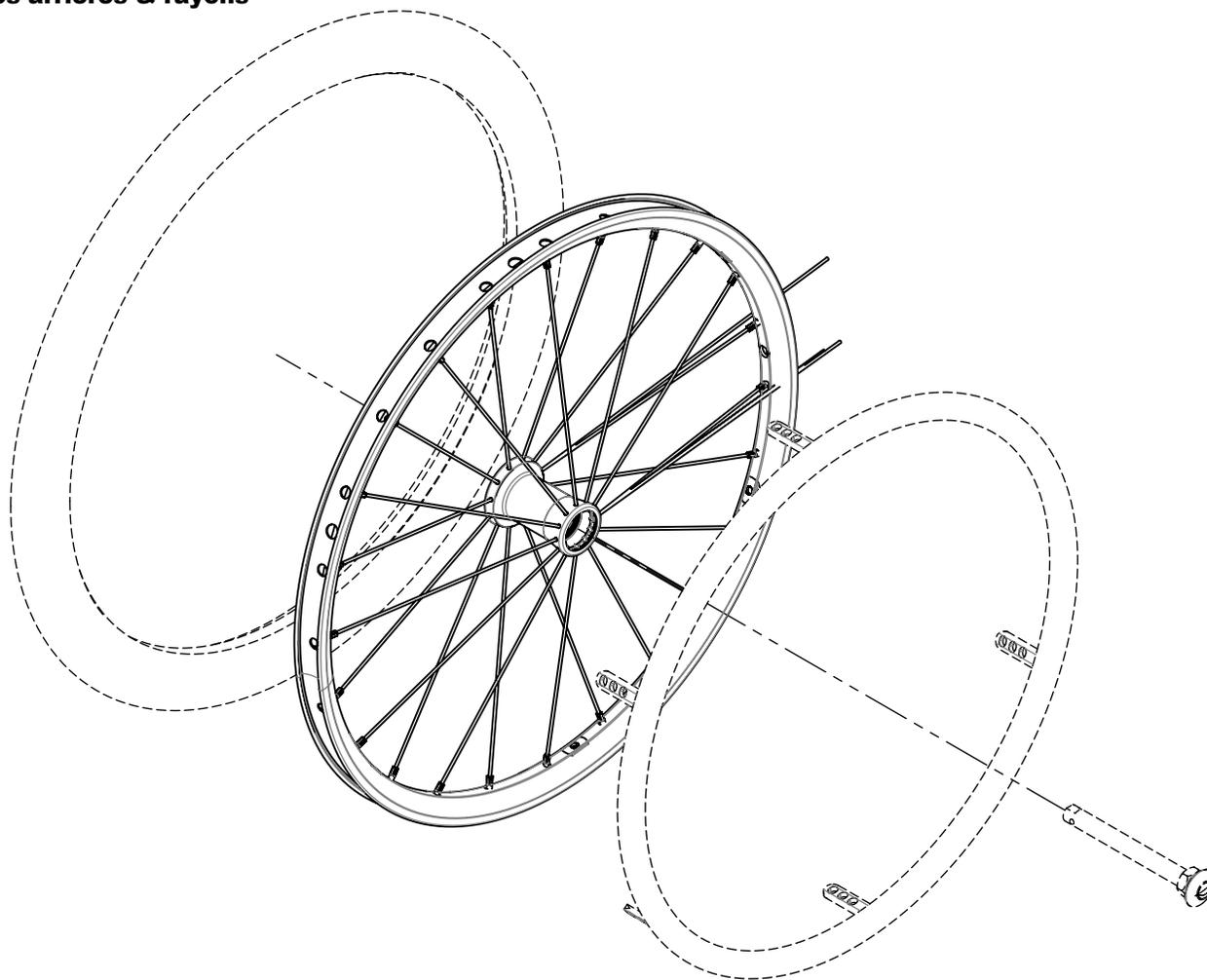


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	9001483A-00	ROUE ARRIÈRE - PLASTIQUE MAG, 20po	1
2	9001484A-00	ROUE ARRIÈRE - PLASTIQUE MAG, 22po	1
3	9001485A-00	ROUE ARRIÈRE - PLASTIQUE MAG, 24po	1
4	9001446A-00	ROUE ARRIÈRE - NEWTON ONE, 20po	1
5	9001486A-00	ROUE ARRIÈRE - NEWTON ONE, 22po	1
6	9001487A-00	ROUE ARRIÈRE - NEWTON ONE, 24po	1
7	9001488A-00	ROUE ARRIÈRE - NEWTON GRAVITY, 20po	1
8	9001489A-00	ROUE ARRIÈRE - NEWTON GRAVITY, 22po	1
9	9001490A-00	ROUE ARRIÈRE - NEWTON GRAVITY, 24po	1
10	9001491A-00	ROUE ARRIÈRE - NEWTON GRAVITY, 25po	1
11	9001492A-00	ROUE ARRIÈRE - NEWTON GRAVITY, 26po	1

**REPLACEMENT DE
 ROULEMENT À BILLES**
POUR TOUTES LES ROUES
NOPIÈCE: 0022011A-00

QUINCAILLERIE INCLUSE AVEC LES ROUES NEWTON

NEWTON ONE

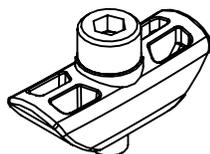

NEWTON GRAVITY



	RAYONS DE ROUE				
	NEWTON ONE (24)	NEWTON ONE (36)	NEWTON GRAVITY (24)		
	EXT. & INT. ARGENT	EXT. & INT. ARGENT	EXT. BLANC (1)	EXT. NOIR (11)	INT. NOIR (12)
20"	21271 (1)		21157	21156 (1)	21155 (1)
22"		21153 (1)	21160	21159 (1)	21158 (1)
24"		21154 (1)	21163	21162 (1)	21161 (1)
25"	-	-	21166	21165 (1)	21164 (1)
26"	-	-	21169	21168 (1)	21167 (1)
ECROUS	21181 (ECROU ARGENT)		21180 (ECROU NOIR)		


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

Catalogue de roues arrière
Roues arrières Spinergy CLX Blade



SPINERGY CLX BLADE

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	9008122A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY CLX BLADE, 24PO, NOIR	1
2	9008123A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY CLX BLADE, 25PO, NOIR	1
3	9008127A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY CLX BLADE, 24PO, BLEU	1
4	9008128A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY CLX BLADE, 25PO, BLEU	1
5	9008132A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY CLX BLADE, 24PO, ROUGE	1
6	9008133A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY CLX BLADE, 25PO, ROUGE	1
7	9008137A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY CLX BLADE, 24PO, VERT	1
8	9008138A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY CLX BLADE, 25PO, VERT	1
9	9008142A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY CLX BLADE, 24PO, ORANGE	1
10	9008143A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY CLX BLADE, 25PO, ORANGE	1
11	9008147A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY CLX BLADE, 24PO, JAUNE	1
12	9008148A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY CLX BLADE, 25PO, JAUNE	1
13	9008152A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY CLX BLADE, 24PO, ROSE	1
14	9008153A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY CLX BLADE, 25PO, ROSE	1
15	9008157A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY CLX BLADE, 24PO, BLANC	1
16	9008158A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY CLX BLADE, 25PO, BLANC	1
17	9008162A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY CLX BLADE, 24PO, VIOLET	1
18	9008163A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY CLX BLADE, 25PO, VIOLET	1

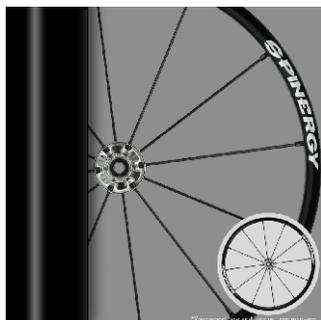

**REPLACEMENT DE
ROULEMENT À BILLES**

POUR TOUTES LES ROUES

NoPIÈCE: 22011



NE PREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

Catalogue de roues arrière
Roues arrières Spinergy

REPLACEMENT DE ROULEMENT À BILLES

POUR TOUTES LES ROUES

NoPIÈCE: 22011





SPINERGY SPOX



SPINERGY LX

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	9001494A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY SPOX, 22PO, NOIR	1
2	9001495A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY SPOX, 24PO, NOIR	1
3	9001496A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY SPOX, 25PO, NOIR	1
4	9001497A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY SPOX, 26PO, NOIR	1
5	9003413A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY SPOX, 22PO, BLEU	1
6	9003414A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY SPOX, 24PO, BLEU	1
7	9003415A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY SPOX, 25PO, BLEU	1
8	9003416A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY SPOX, 26PO, BLEU	1
9	9003418A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY SPOX, 22PO, ROUGE	1
10	9003419A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY SPOX, 24PO, ROUGE	1
11	9003420A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY SPOX, 25PO, ROUGE	1
12	9003421A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY SPOX, 26PO, ROUGE	1
13	9003433A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY SPOX, 22PO, JAUNE	1
14	9003434A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY SPOX, 24PO, JAUNE	1
15	9003435A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY SPOX, 25PO, JAUNE	1
16	9003436A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY SPOX, 26PO, JAUNE	1
17	9003443A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY SPOX, 22PO, BLANC	1
18	9003444A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY SPOX, 24PO, BLANC	1
19	9003445A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY SPOX, 25PO, BLANC	1
20	9003446A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY SPOX, 26PO, BLANC	1


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
21	9001498A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 22PO, NOIR	1
22	9001499A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 24PO, NOIR	1
23	9001500A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 25PO, NOIR	1
24	9001501A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 26PO, NOIR	1
25	9003448A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 22PO, BLEU	1
26	9003449A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 24PO, BLEU	1
27	9003450A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 25PO, BLEU	1
28	9003451A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 26PO, BLEU	1
29	9003453A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 22PO, ROUGE	1
30	9003454A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 24PO, ROUGE	1
31	9003455A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 25PO, ROUGE	1
32	9003456A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 26PO, ROUGE	1
33	9003458A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 22PO, VERT	1
34	9003459A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 24PO, VERT	1
35	9003460A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 25PO, VERT	1
36	9003461A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 26PO, VERT	1
37	9003463A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 22PO, ORANGE	1
38	9003464A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 24PO, ORANGE	1
39	9003465A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 25PO, ORANGE	1
40	9003466A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 26PO, ORANGE	1
41	9003468A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 22PO, JAUNE	1
42	9003469A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 24PO, JAUNE	1
43	9003470A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 25PO, JAUNE	1
44	9003471A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 26PO, JAUNE	1
45	9003473A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 22PO, ROSE	1
46	9003474A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 24PO, ROSE	1
47	9003475A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 25PO, ROSE	1
48	9003476A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 26PO, ROSE	1
49	9003478A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 22PO, BLANC	1
50	9003479A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 24PO, BLANC	1
51	9003480A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 25PO, BLANC	1
52	9003481A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 26PO, BLANC	1
53	9003482A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 22PO, VIOLET	1
54	9003483A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 24PO, VIOLET	1
55	9003484A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 25PO, VIOLET	1
56	9003485A-00	ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 26PO, VIOLET	1

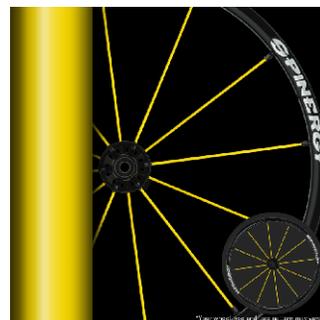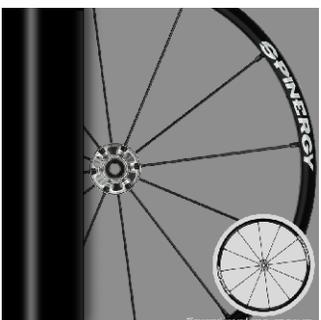

**SEULES COULEURS
DISPONIBLES POUR
SPINERGY SPOX**

**ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE
NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS
AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
POUR VOTRE FAUTEUIL
MOTION COMPOSITES**

Catalogue de roues arrière
Roues arrière + pneus

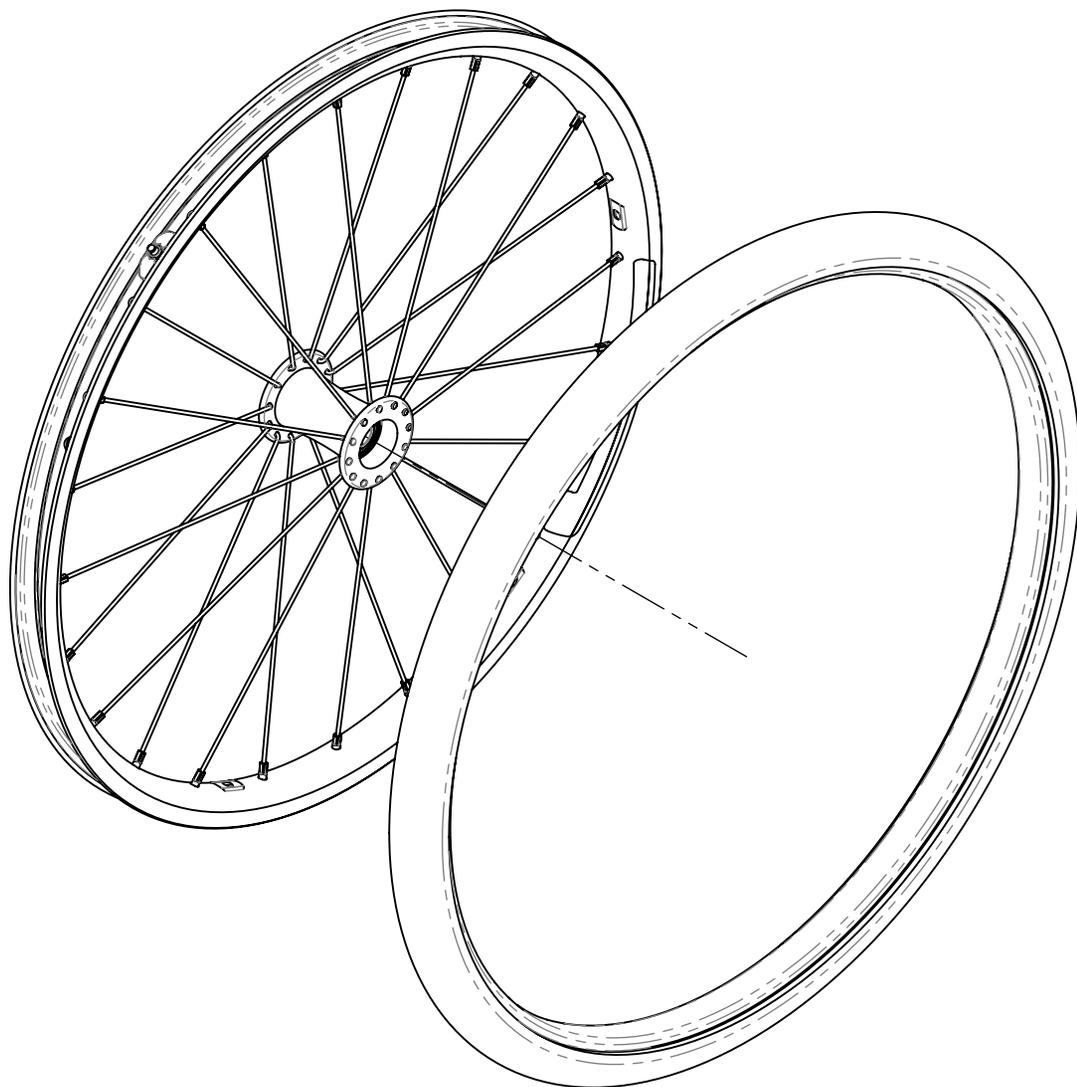

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	9002499A-00	ROUE NEWTON ONE & PNEU SEMI-DUR 20po	1
2	9002500A-00	ROUE NEWTON ONE & PNEU SEMI-DUR 22po	1
3	9002501A-00	ROUE NEWTON ONE & PNEU SEMI-DUR 24po	1
4	9002502A-00	ROUE NEWTON GRAVITY & PNEU SEMI-DUR 20po	1
5	9002503A-00	ROUE NEWTON GRAVITY & PNEU SEMI-DUR 22po	1
6	9002504A-00	ROUE NEWTON GRAVITY & PNEU SEMI-DUR 24po	1
7	9002497A-00	ROUE NEWTON ONE & PNEU HP, 20po	1
8	9002505A-00	ROUE NEWTON ONE & PNEU HP, 22po	1
9	9002506A-00	ROUE NEWTON ONE & PNEU HP, 24po	1
10	9002507A-00	ROUE NEWTON GRAVITY & PNEU HP, 20po	1
11	9002508A-00	ROUE NEWTON GRAVITY & PNEU HP, 22po	1
12	9002509A-00	ROUE NEWTON GRAVITY & PNEU HP, 24po	1
13	9002519A-00	ROUE NEWTON GRAVITY & PNEU HP, 25po	1
14	9002510A-00	ROUE NEWTON GRAVITY & PNEU HP, 26po	1
15	9002498A-00	ROUE NEWTON ONE & PNEU PRESSION STD, 20po	1
16	9002511A-00	ROUE NEWTON ONE & PNEU PRESSION STD, 22po	1
17	9002512A-00	ROUE NEWTON ONE & PNEU PRESSION STD, 24po	1
18	9002513A-00	ROUE NEWTON GRAVITY & PNEU PRESSION STD, 20po	1
19	9002514A-00	ROUE NEWTON GRAVITY & PNEU PRESSION STD, 22po	1
20	9002515A-00	ROUE NEWTON GRAVITY & PNEU PRESSION STD, 24po	1
21	9002520A-00	ROUE NEWTON GRAVITY & PNEU PRESSION STD, 25po	1
22	9002516A-00	ROUE NEWTON GRAVITY & PNEU PRESSION STD, 26po	1


**REPLACEMENT DE
 ROULEMENT À BILLES**

POUR TOUTES LES ROUES

NOPIÈCE: 22011


Catalogue de roues arrière
Protèges-rayons

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	9001629A-00	PROTÈGE-RAYONS - 20po	1
2	9001630A-00	PROTÈGE-RAYONS - 22po	1
3	9001631A-00	PROTÈGE-RAYONS - 24po	1
4	9001632A-00	PROTÈGE-RAYONS - 26po	1

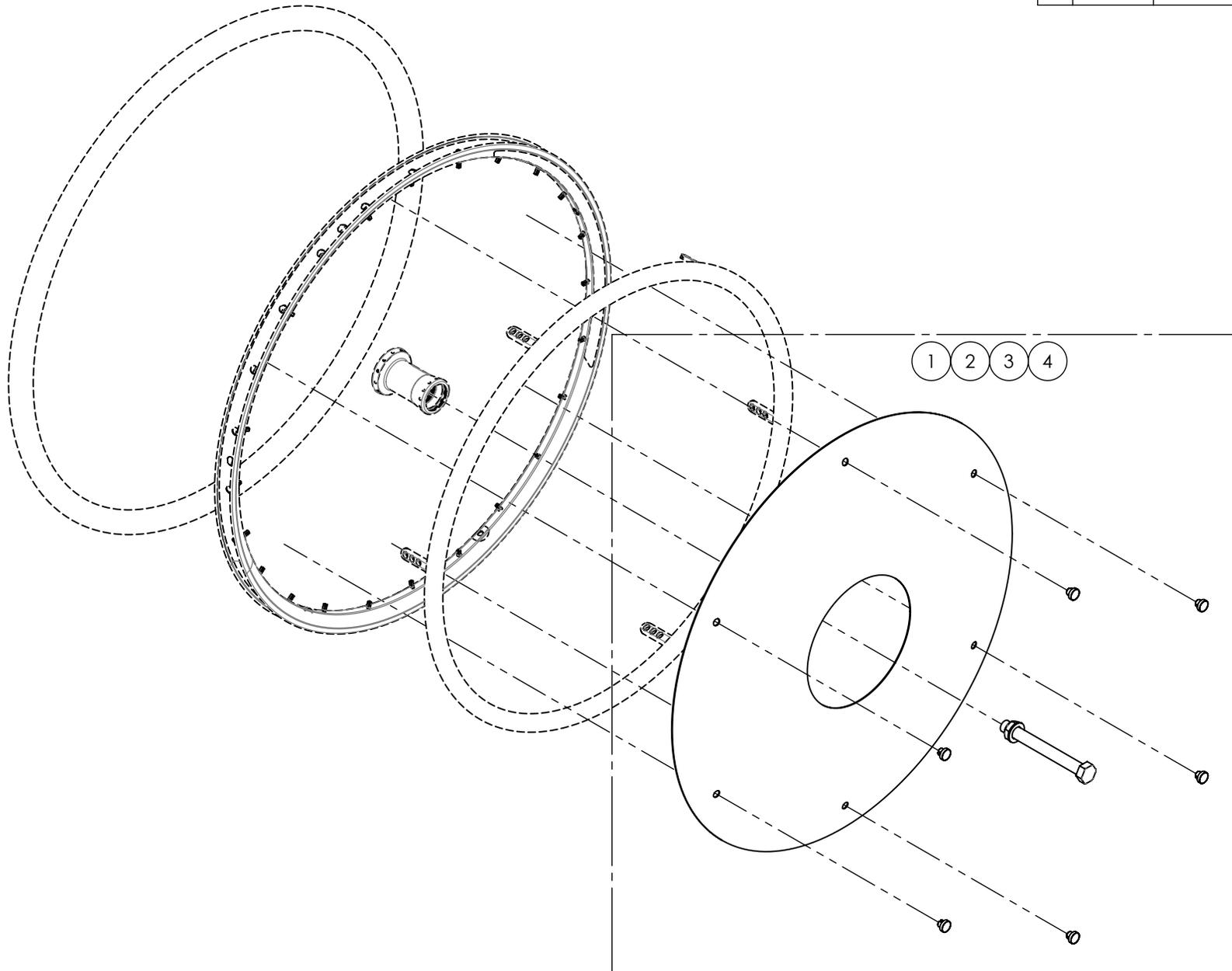

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

Catalogue de roues arrière Pneus

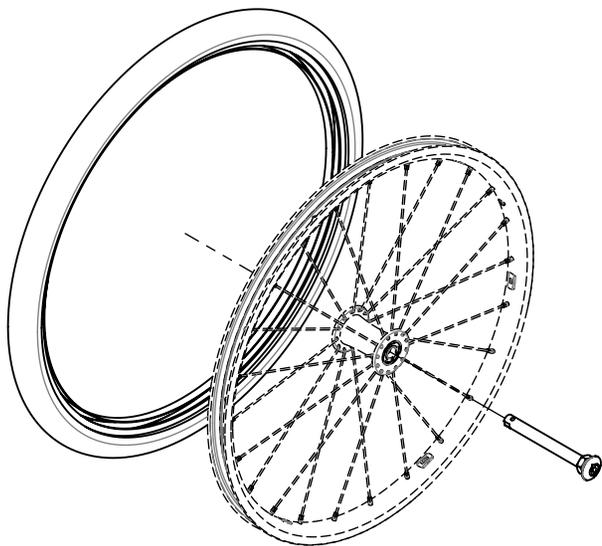

**LES TUBES ET FONDS DE JANTE SONT DÉJÀ
INCLUS DANS TOUS LES PNEUMATIQUES**


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0021365A-00	PNEUS SEMI-DURS 20x1-1/4po	1
2	0021366B-00	PNEUS SEMI-DURS 22x1-1/4po	1
3	0021367B-00	PNEUS SEMI-DURS 24x1-1/4po	1
4	9001510A-00	PNEU & COMP - PRESSION STD, 1% X20po	1
	0021315A-00	PNEUS PNEUMATIQUE 20x1-3/8po	1
	0021255A-00	CHAMBRE À AIR SCHRADER 20x1%po	1
	0021064A-00	FOND DE JANTE 20po	1
5	9001511A-00	PNEU & COMP - PRESSION STD, 1% X22po	1
	0021316A-00	PNEUS PNEUMATIQUE 22x1-3/8po	1
	0021256A-00	CHAMBRE À AIR SCHRADER 22x1%po	1
	0021065A-00	FOND DE JANTE 22po	1
6	9001512A-00	PNEU & COMP - PRESSION STD, 1% X24po	1
	0021317A-00	PNEUS PNEUMATIQUE 24x1-3/8po	1
	0021257A-00	CHAMBRE À AIR SCHRADER 24x1%po	1
	0021066A-00	FOND DE JANTE 24po	1
7	9001513A-00	PNEU & COMP - PRESSION STD, 1% X25po	1
	0021318A-00	PNEUS PNEUMATIQUE 25x1-3/8po	1
	0021253A-00	CHAMBRE À AIR SCHRADER 25x1po	1
	0021067A-00	FOND DE JANTE 25po	1
8	9001514A-00	PNEU & COMP - PRESSION STD, 1% X26po	1
	0021319A-00	PNEUS PNEUMATIQUE 26x1-3/8po	1
	0021259A-00	CHAMBRE À AIR SCHRADER 26x1%po	1
	0021068A-00	FOND DE JANTE 26po	1
9	0021391A-00	PNEUS DURS 22po - PYRAMID	1
10	0021392A-00	PNEUS DURS 24po - PYRAMID	1
11	0021393A-00	PNEUS DURS 25po - PYRAMID	1
12	9001517A-00	PNEU & COMP - SCHWALBE RIGHTRUN HP, 1x 20po	1
	0021305A-00	PNEUS HP RIGHTRUN 20x1po	1
	0021250A-00	CHAMBRE À AIR SCHRADER 20x1po	1
	0021064A-00	FOND DE JANTE 20po	1
13	9001518A-00	PNEU & COMP - SCHWALBE RIGHTRUN HP, 1x 22po	1
	0021306A-00	PNEUS HP RIGHTRUN 22x1po	1
	0021251A-00	CHAMBRE À AIR SCHRADER 22x1po	1
	0021065A-00	FOND DE JANTE 22po	1
14	9001519A-00	PNEU & COMP - SCHWALBE RIGHTRUN HP, 1x 24po	1
	0021307A-00	PNEUS HP RIGHTRUN 24x1po	1
	0021252A-00	CHAMBRE À AIR SCHRADER 24x1po	1
	0021066A-00	FOND DE JANTE 24po	1
15	9001520A-00	PNEU & COMP - SCHWALBE RIGHTRUN HP, 1x 25po	1
	0021308A-00	PNEUS HP RIGHTRUN 25x1po	1
	0021253A-00	CHAMBRE À AIR SCHRADER 25x1po	1
	0021067A-00	FOND DE JANTE 25po	1
16	9001521A-00	PNEU & COMP - SCHWALBE RIGHTRUN HP, 1x 26po	1
	0021309A-00	PNEUS HP RIGHTRUN 26x1po	1
	0021254A-00	CHAMBRE À AIR SCHRADER 26x1po	1
	0021068A-00	FOND DE JANTE 26po	1

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
17	9001522-00	PNEU & COMP - KENDA KOURIER HP, 1% x24po	1
	0021322A-00	PNEUS KOURIER 24POX1-3/8po	1
	0021257A-00	CHAMBRE À AIR SCHRADER 24x1%po	1
	0021066A-00	FOND DE JANTE 24po	1
18	9001523-00	PNEU & COMP - KENDA KOURIER HP, 1% x26po	1
	0021324A-00	PNEUS KOURIER 26POX1-3/8po	1
	0021259A-00	CHAMBRE À AIR SCHRADER 26x1%po	1
	0021068A-00	FOND DE JANTE 26po	1
19	0021356A-00	PNEUS SEMI-DURS HP SHOX 22 POX1po	1
20	0021357A-00	PNEUS SEMI-DURS HP SHOX 24 POX1po	1
21	0021358A-00	PNEUS SEMI-DURS HP SHOX 25 POX1po	1
22	0021359A-00	PNEUS SEMI-DURS HP SHOX 26 POX1po	1
23	9001528A-00	PNEU & COMP - SCHWALBE MARATHON PLUS, 1x 24po	1
	0021312A-00	PNEUS HP MARATHON PLUS 24x1po	1
	0021252A-00	CHAMBRE À AIR SCHRADER 24x1po	1
	0021066A-00	FOND DE JANTE 24po	1
24	9001529A-00	PNEU & COMP - SCHWALBE MARATHON PLUS, 1x 25po	1
	0021313A-00	PNEUS HP MARATHON PLUS 25x1po	1
	0021253A-00	CHAMBRE À AIR SCHRADER 25x1po	1
	0021067A-00	FOND DE JANTE 25po	1
25	9001530A-00	PNEU & COMP - SCHWALBE MARATHON PLUS, 1x 26po	1
	0021314A-00	PNEUS HP MARATHON PLUS 26x1po	1
	0021254A-00	CHAMBRE À AIR SCHRADER 26x1po	1
	0021068A-00	FOND DE JANTE 26po	1
26	0021375A	PNEUS SEMI-DURS A CRAMPON 22x1% po	1
27	0021376B-00	PNEUS SEMI-DURS A CRAMPON 24x1% po	1
28	0021377A-00	PNEUS SEMI-DURS A CRAMPON 25x1% po	1
29	0021378A-00	PNEUS SEMI-DURS A CRAMPON 26x1% po	1
30	9003044A-00	PNEU & COMP - PNEUMATIQUE À CRAMPON, 2x 22po	1
	0021379A-00	PNEUS PNEUMATIQUE A CRAMPON 22x2po	1
	0021065A-00	FOND DE JANTE 22po	1
	0021256A-00	CHAMBRE À AIR SCHRADER 22x1%po	1
31	9003045A-00	PNEU & COMP - PNEUMATIQUE À CRAMPON, 2x 24po	1
	0021380A-00	PNEUS PNEUMATIQUE A CRAMPON 24x2po	1
	0021266A-00	CHAMBRE À AIR SCHRADER 24x2po	1
	0021066A-00	FOND DE JANTE 24po	1
32	9003046A-00	PNEU & COMP - PNEUMATIQUE À CRAMPON, 2x 25po	1
	0021381A-00	PNEUS PNEUMATIQUE A CRAMPON 25x2po	1
	0021267A-00	CHAMBRE À AIR SCHRADER 25x2po	1
	0021067A-00	FOND DE JANTE 25po	1



ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

0041056A_0041057A
BLOCAGE DE ROUE NEWTON PAR POUSSÉE - ASSY


NO. ITEM	DESCRIPTION	0041056 /QTE	0041057 /QTE
1	BLOCAGE DE ROUE NEWTON PAR POUSSÉE, DROIT - ASSY	-	1
2	BLOCAGE DE ROUE NEWTON PAR POUSSÉE, GAUCHE - ASSY	1	-

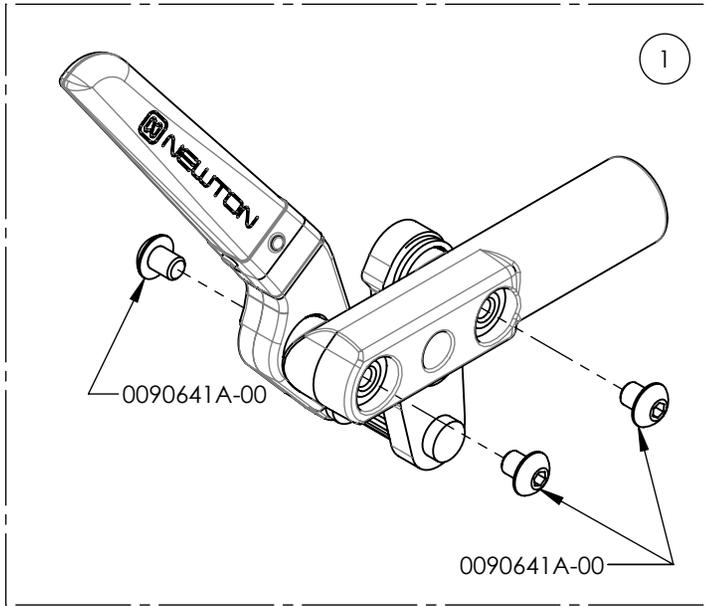

0041057A-00
 BLOCAGE DE ROUE NEWTON PAR POUSSÉE,
 DROIT - ASSY

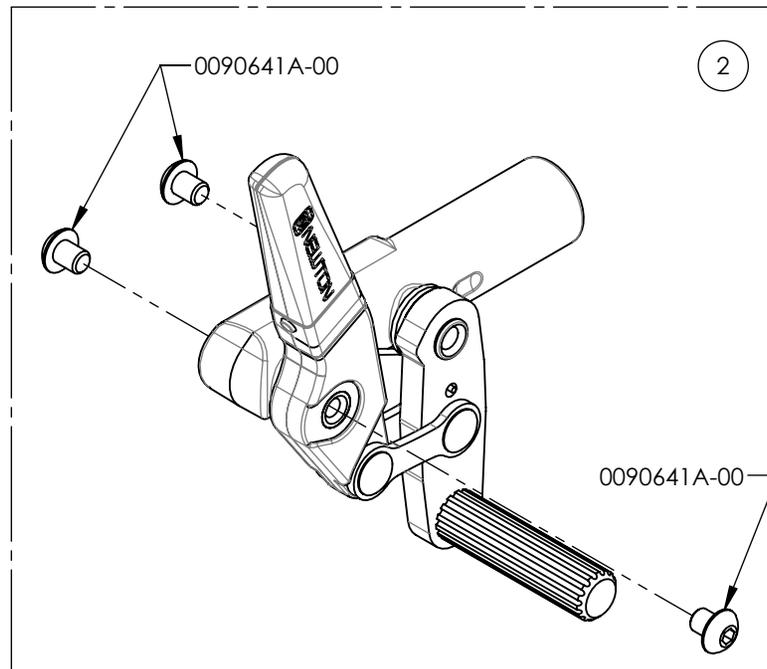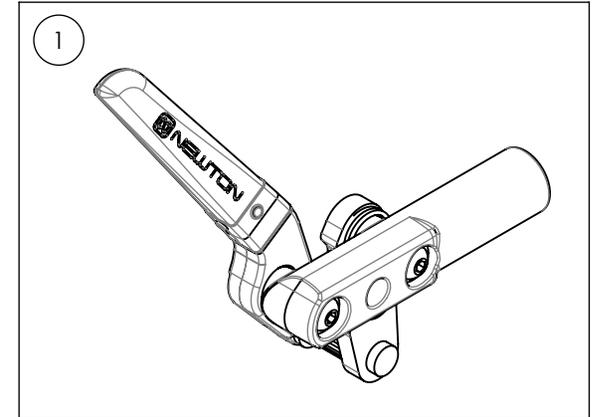




0041056A-00
 BLOCAGE DE ROUE NEWTON PAR POUSSÉE,
 GAUCHE - ASSY

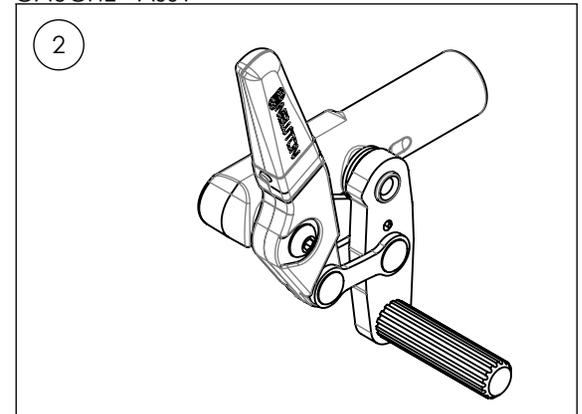


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

0041076B_0041077B
BLOCAGE POUSSÉE NEWTON V2 & RALL - ASSY


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	0041076/ QTE	0041077/ QTE	EXTRA
1	0041516B-00	BLOCAGE POUSSÉE NEWTON V2, DROITE - ASSY	1	-	-
2	0041517B-00	BLOCAGE POUSSÉE NEWTON V2, GAUCHE - ASSY	-	1	-
3	0041500A-00	RALLONGE LEVIER FREIN AMOVIBLE NEWTON - ASSEMBLAGE	-	-	1

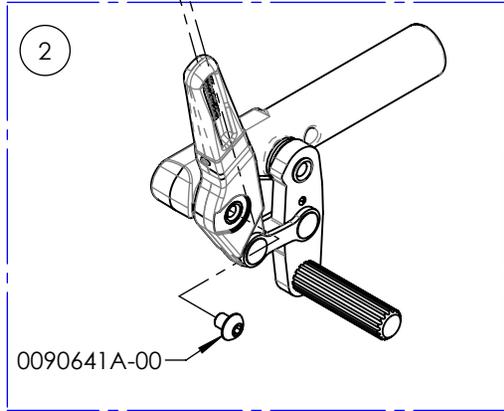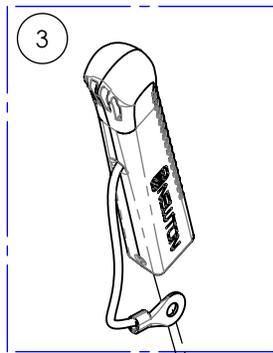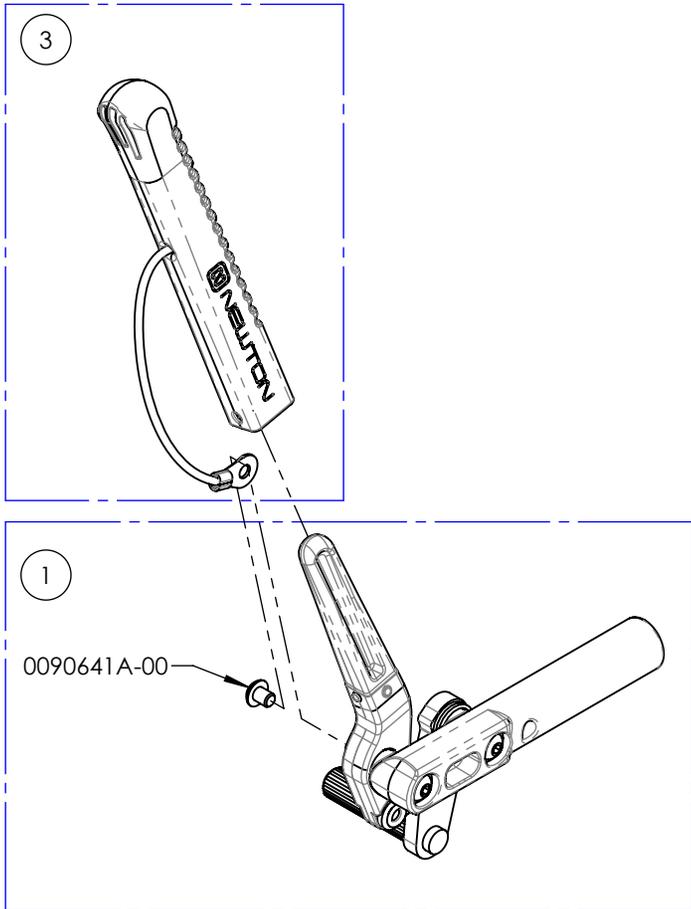

0041076B-00
 BLOCAGE POUSSÉE NEWTON V2 &
 RALL, DROITE - ASSY

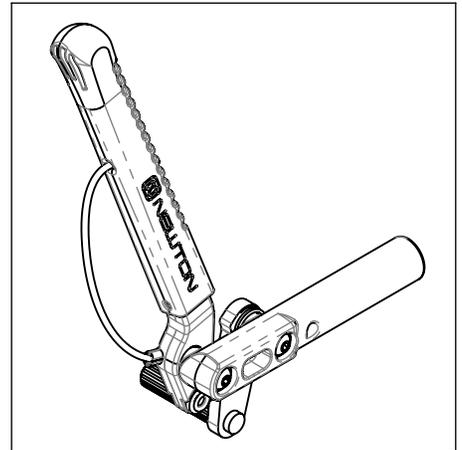


0041077B-00
 BLOCAGE POUSSÉE NEWTON V2 &
 RALL, GAUCHE - ASSY

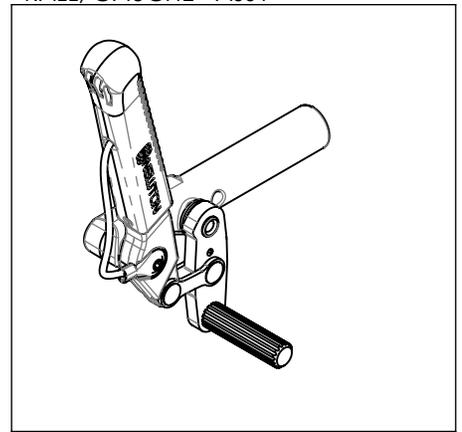


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

0041078A_0041079A
BLOCAGE PAR TRACTION ALU


No. ITEM	DESCRIPTION	0041078 /QTE	0041079 /QTE
1	BLOCAGE PAR TRACTION ALU, DROITE	1	-
2	BLOCAGE PAR TRACTION ALU, GAUCHE	-	1

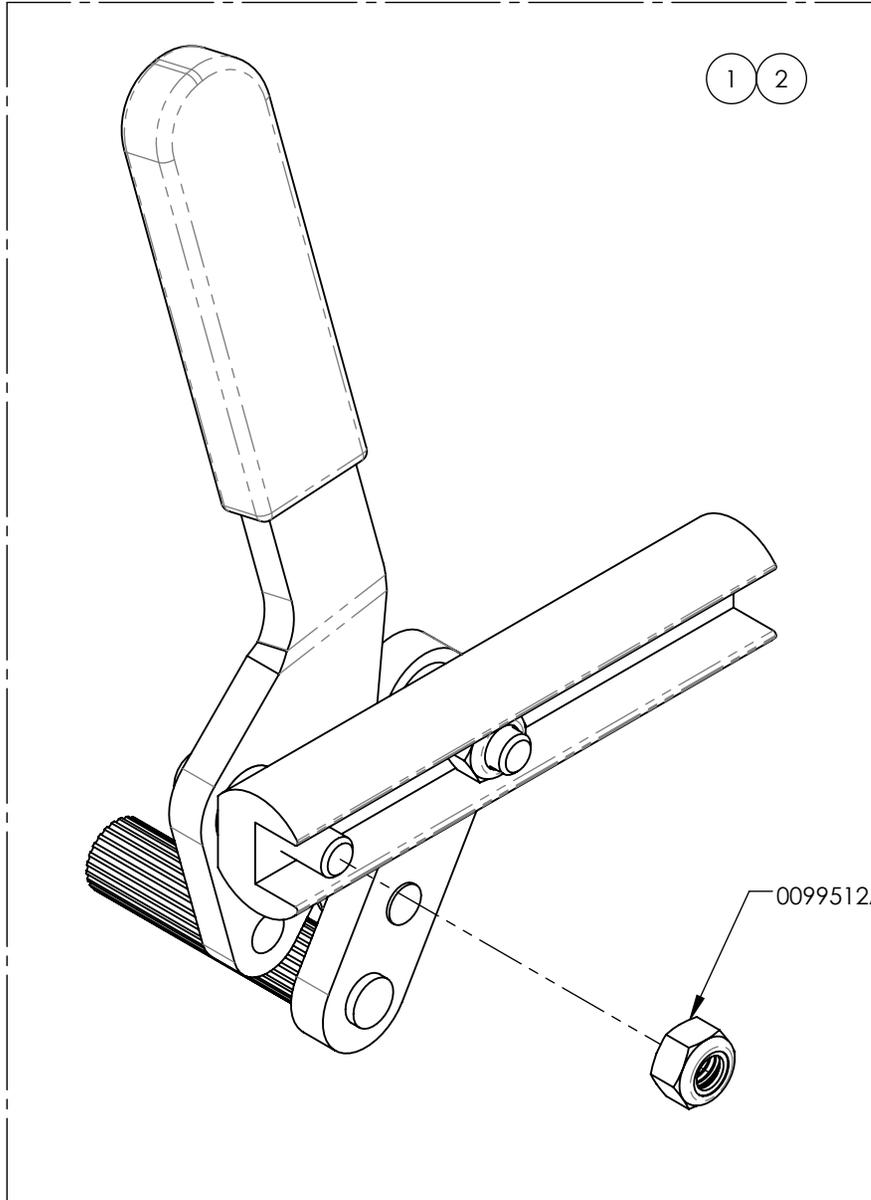

0041078A-00
 BLOCAGE PAR TRACTION ALU, DROITE

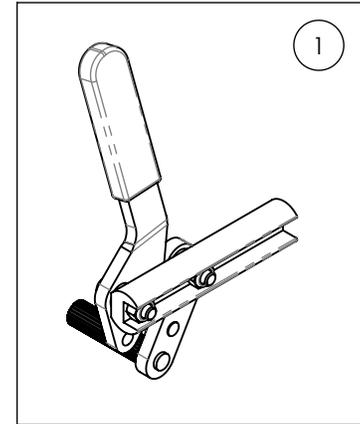


0041079A-00
 BLOCAGE PAR TRACTION ALU, GAUCHE

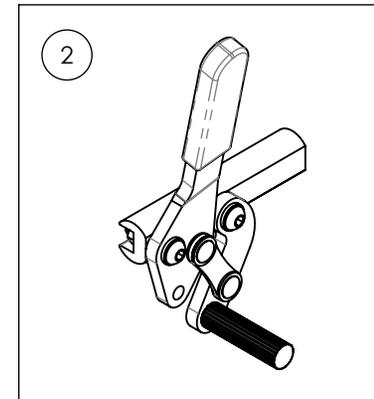


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

0041516B_0041517B
BLOCAGE POUSSÉE NEWTON V2 - ASSY



NO. ITEM	DESCRIPTION	0041516 /QTE	0041517 /QTE
1	BLOCAGE POUSSÉE NEWTON V2, DROITE - ASSY	1	-
2	BLOCAGE POUSSÉE NEWTON V2, GAUCHE - ASSY	-	1

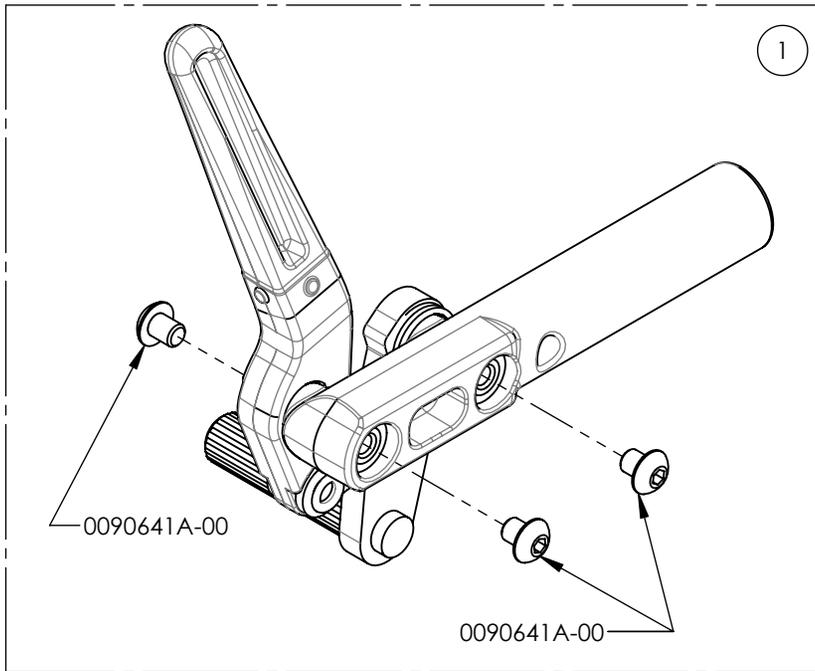

0041516B-00
 BLOCAGE POUSSÉE NEWTON V2, DROITE - ASSY

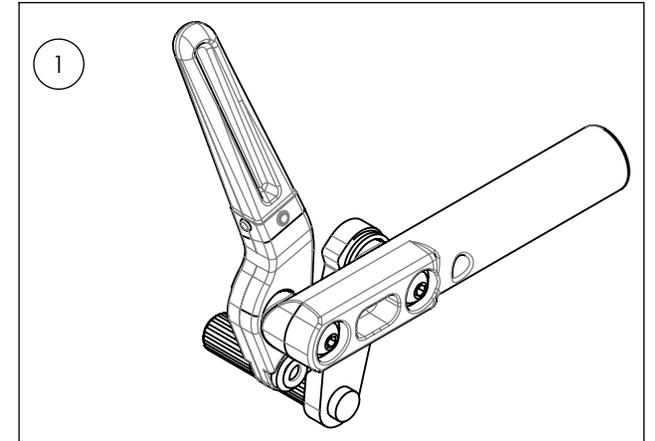


0041517B-00
 BLOCAGE POUSSÉE NEWTON V2, GAUCHE - ASSY

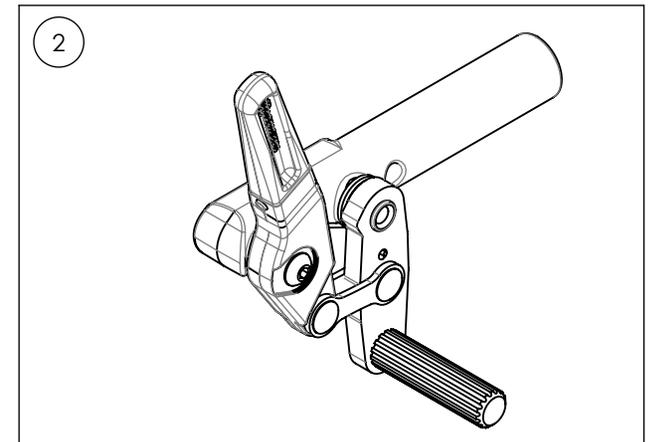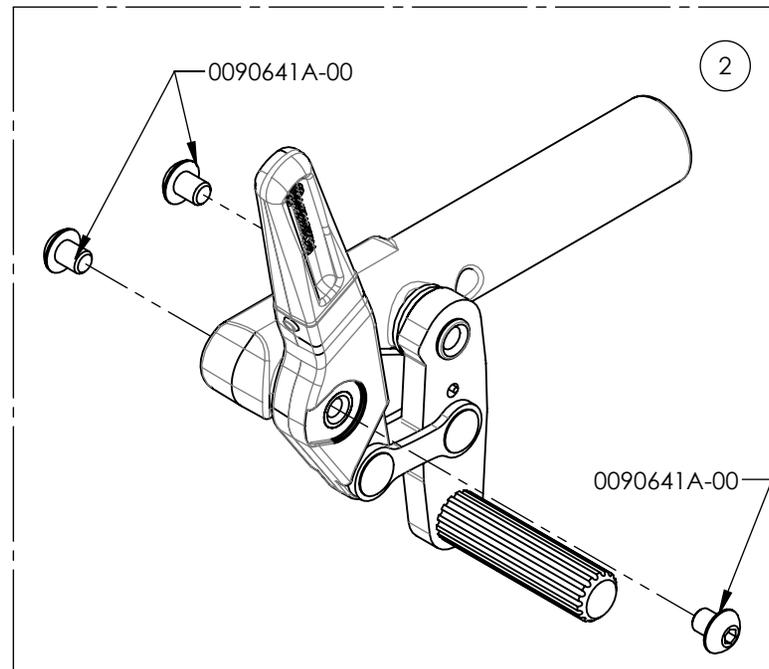


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

0041712A_0041713A
BLOCAGE PAR TRACTION ALU + RAIL ALL + RALL


No. ITEM	DESCRIPTION	0041712 /QTY.	0041713 /QTY.	REMPLACEMENT PIÈCES/QTÉ
1	BLOCAGE PAR TRACTION ALU + RAIL ALL + RALL, DROITE	1	-	-
2	BLOCAGE PAR TRACTION ALU + RAIL ALL + RALL, GAUCHE	-	1	-
3	RALLONGE LEVIER FREIN AMOVIBLE	-	-	1

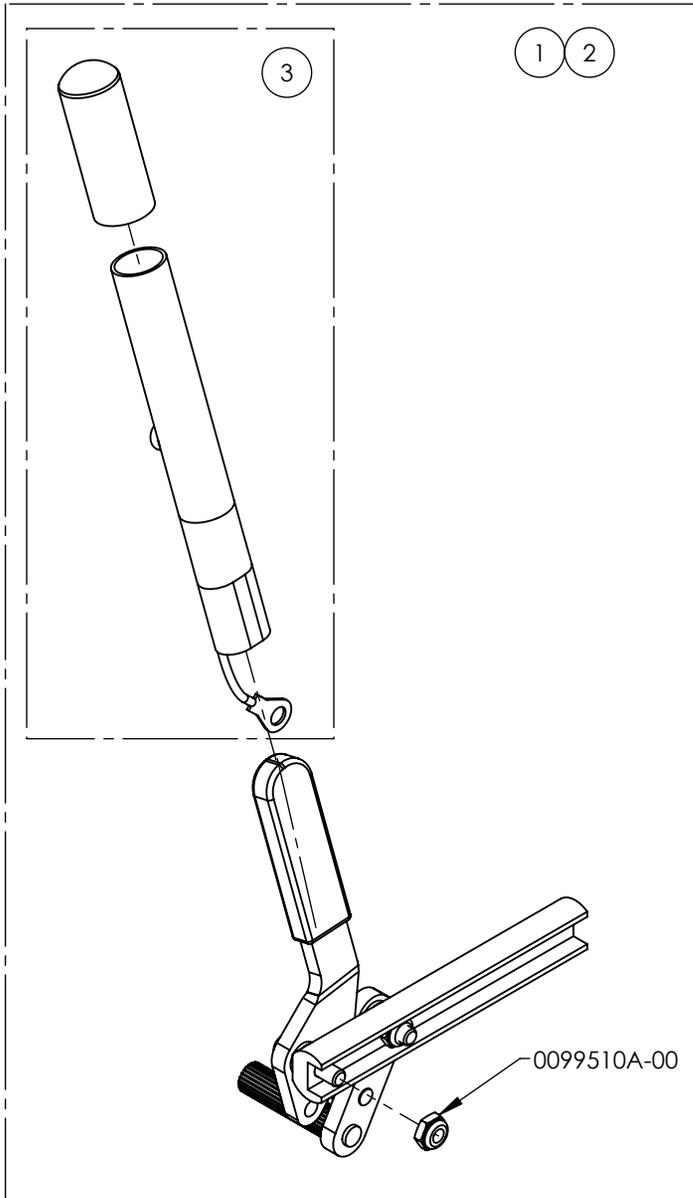

0041712A-00
 BLOCAGE PAR TRACTION ALU +
 RAIL ALL + RALL, DROITE

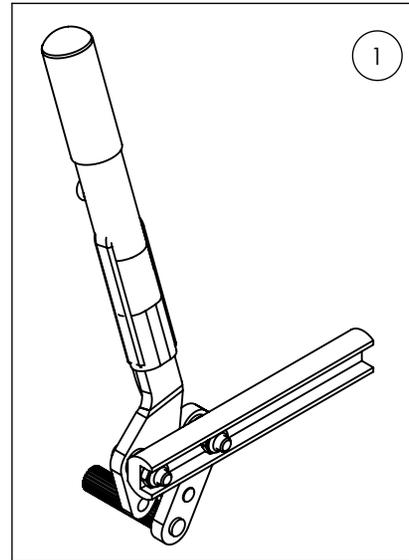


0041713A-00
 BLOCAGE PAR TRACTION ALU +
 RAIL ALL + RALL, GAUCHE

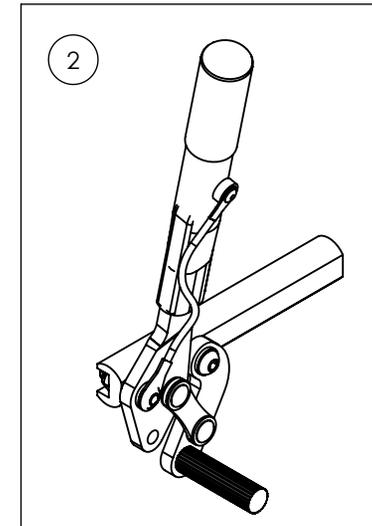


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

0041714A_0041715A
BLOCAGE PAR TRACTION ALU + RAIL ALLONGÉE


No. ITEM	DESCRIPTION	0041714 /QTÉ	0041715 /QTÉ
1	BLOCAGE PAR TRACTION ALU + RAIL ALLONGÉE, DROITE	1	-
2	BLOCAGE PAR TRACTION ALU + RAIL ALLONGÉE, GAUCHE	-	1

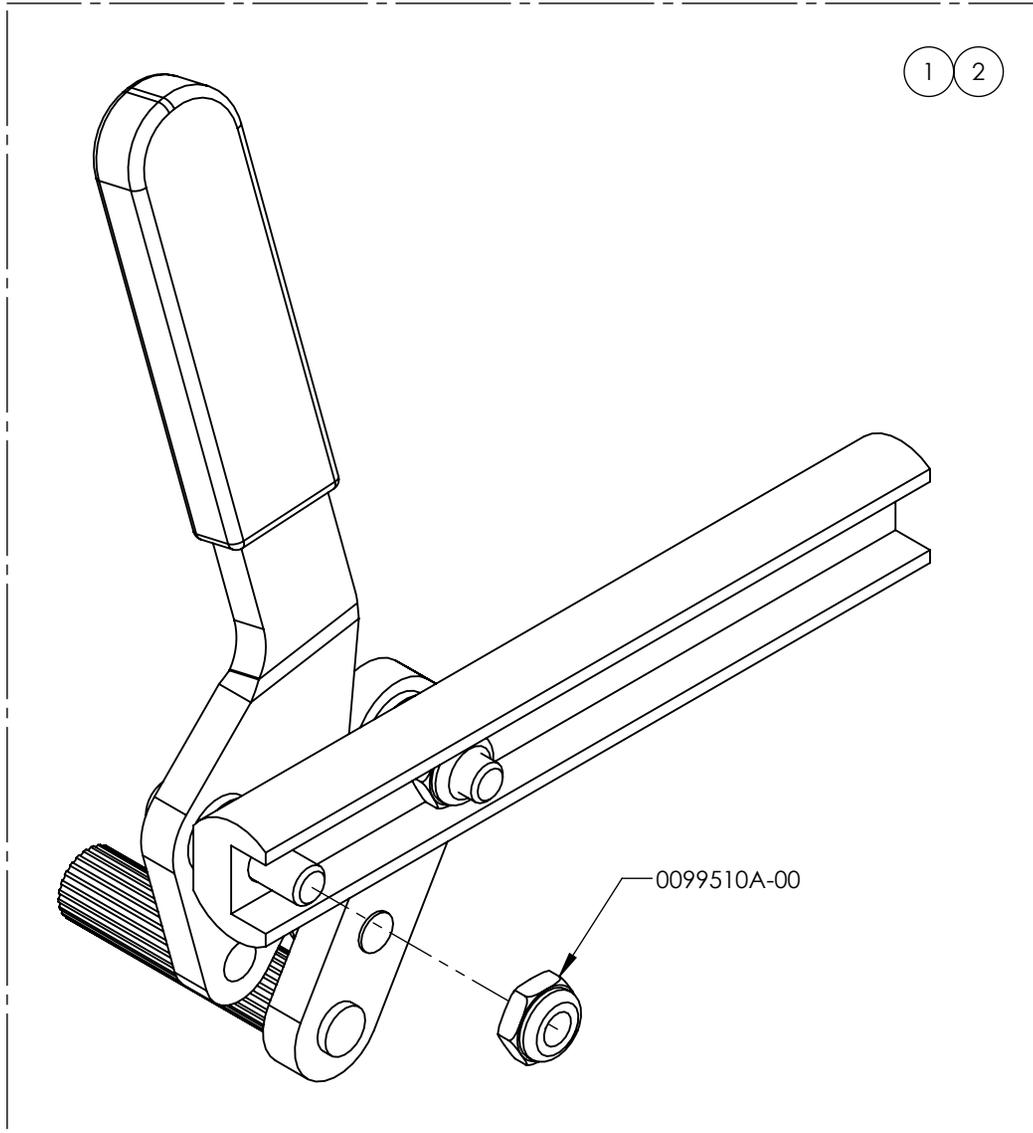

0041714A-00
 BLOCAGE PAR TRACTION ALU +
 RAIL ALLONGÉE, DROITE

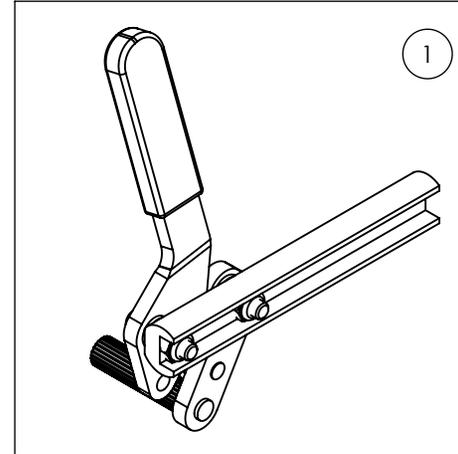


0041715A-00
 BLOCAGE PAR TRACTION ALU +
 RAIL ALLONGÉE, GAUCHE

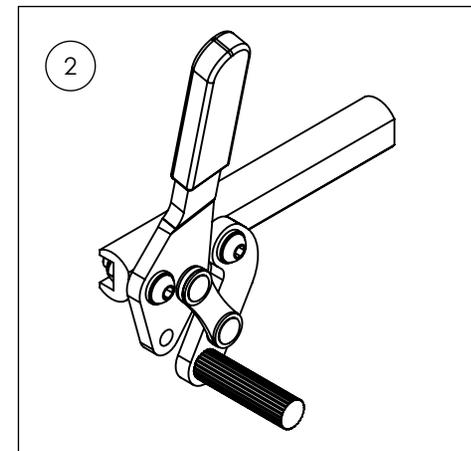



ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9001581A_9001582A**Blocage de roue Newton - Anti-recul, par poussée**


NO. ITEM	NO. PIÈCE	DESCRIPTION	9001581 /QTE	9001582 /QTE
1	0041035A-00	BLOCAGE DE ROUE ANTI-RECUL, DROIT - ASSY	1	-
2	0041036A-00	BLOCAGE DE ROUE ANTI-RECUL, GAUCHE - ASSY	-	1

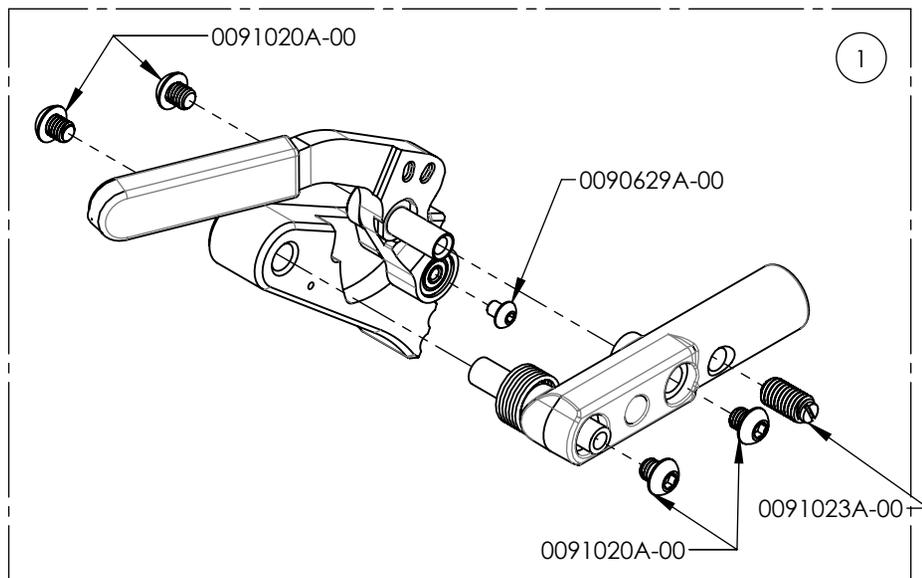

9001581A-00
BLOCAGE ANTI-RECUL - NEWTON,
DROITE

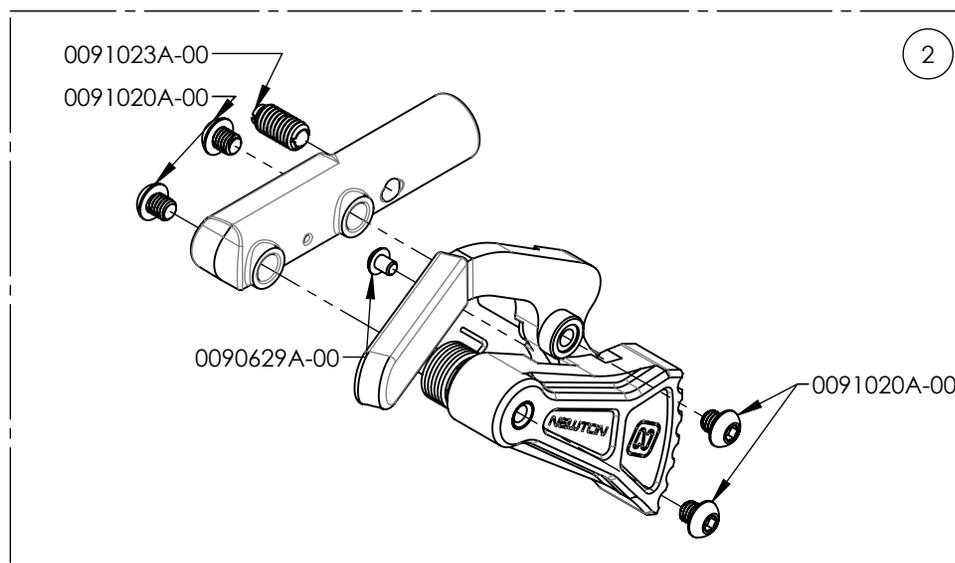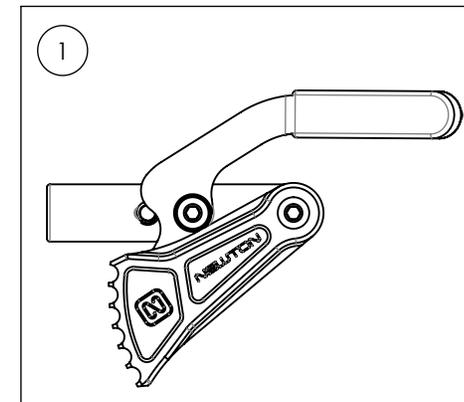


9001582A-00
BLOCAGE ANTI-RECUL - NEWTON,
GAUCHE

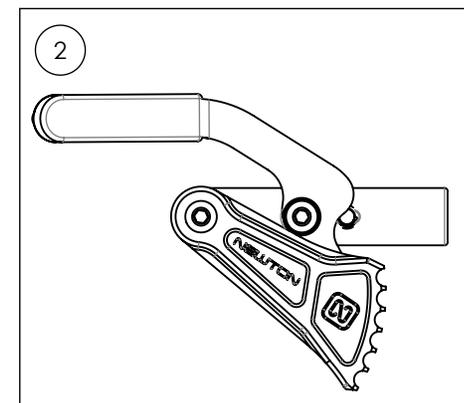



ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9001583A_9001584A
BLOCAGE DE ROUE NEWTON - ANTI-RECUL, PAR POUSSÉE,
AVEC RALLONGE DE LEVIER AMOVIBLE 6 po


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9001583	9001584
1	0041035A-00	BLOCAGE DE ROUE ANTI-RECUL, DROIT - ASSY	1	-
2	0041036A-00	BLOCAGE DE ROUE ANTI-RECUL, GAUCHE - ASSY	-	1
3	0041005A-00	RALLONGE LEVIER FREIN AMOVIBLE	1	1

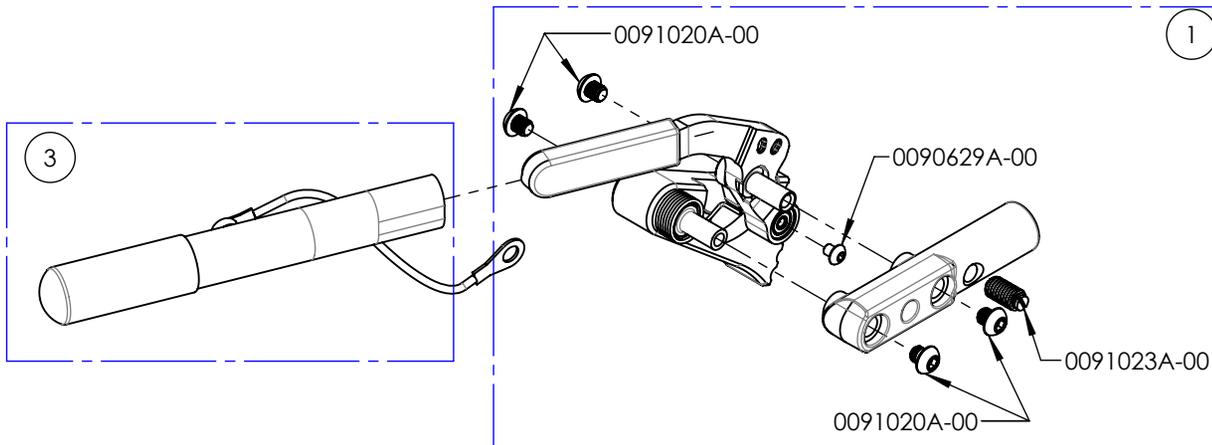

9001583A-00
 BLOCAGE ANTI-RECUL - NEWTON,
 RALLONGE, DROITE

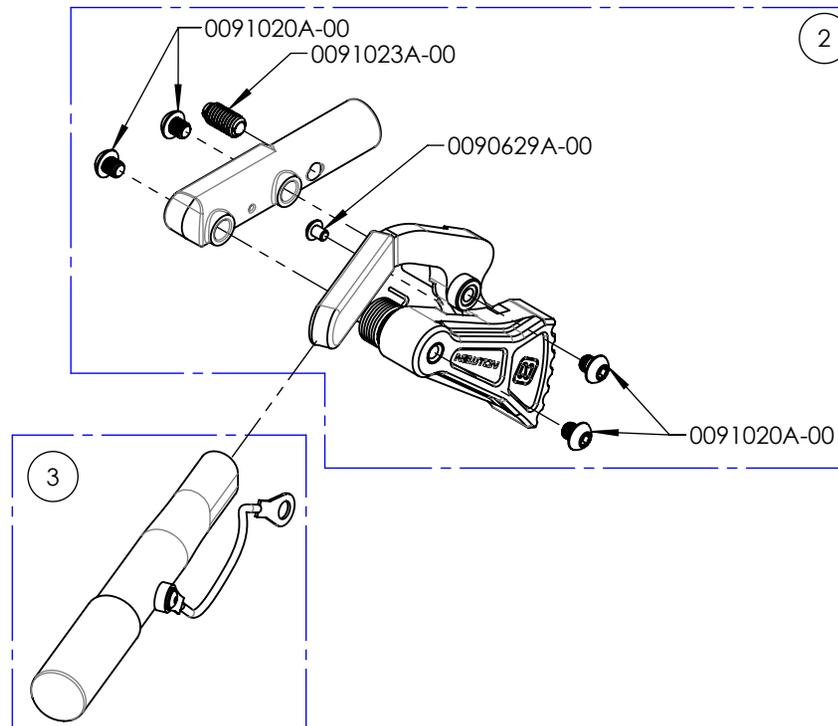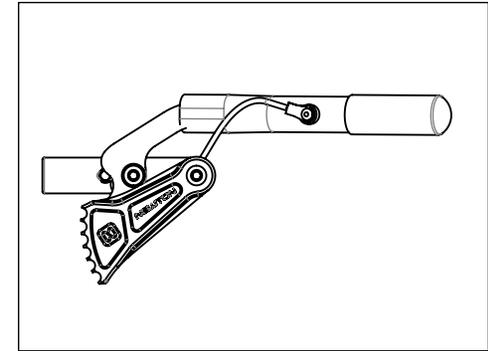


9001584A-00
 BLOCAGE ANTI-RECUL - NEWTON, RALLONGE,
 GAUCHE

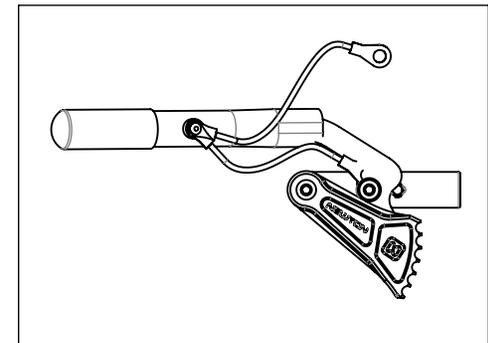



ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9003029A_9003030A
BLOCAGE ANTI-RECU - NEWTON, RAIL ALLONGÉ


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9003029	9003030	EXTRA
1	0041514A-00	ANTI-RECU NEWTON & LR, DROITE - ASSY	1	-	-
2	0041515A-00	ANTI-RECU NEWTON & LR, GAUCHE - ASSY	-	1	-
3	0099701A-00	BOUCHON 3/4po	1	1	-
4	0041075A-00	RAIL DE FREIN ANTI RECU NEWTON ALLONGÉE	-	-	1

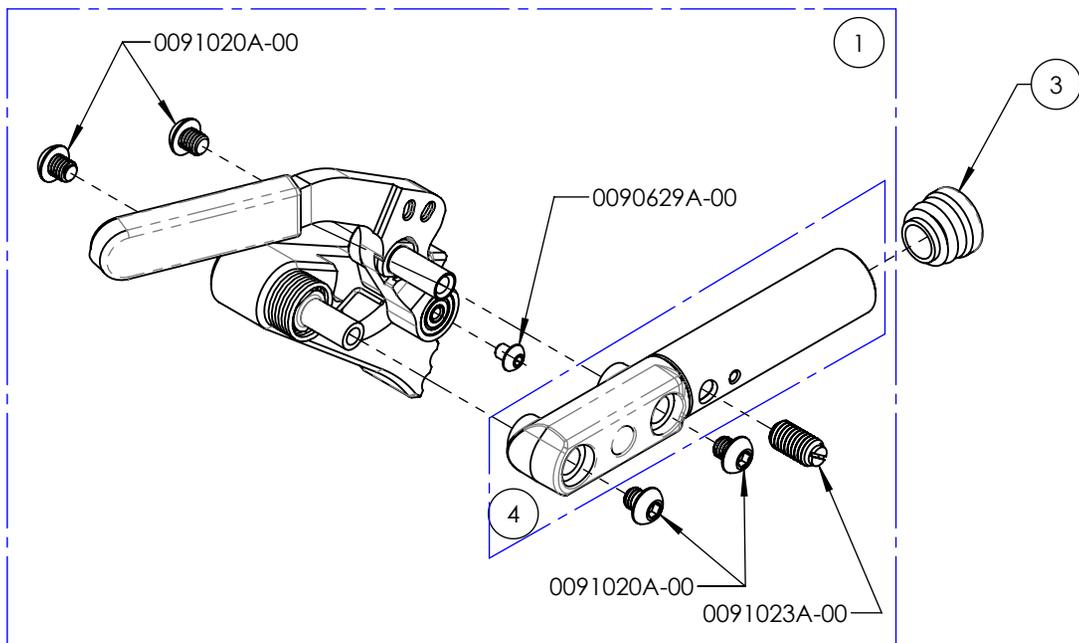

9003029A-00
 BLOCAGE ANTI-RECU - NEWTON, RAIL ALLONGÉ, DROITE

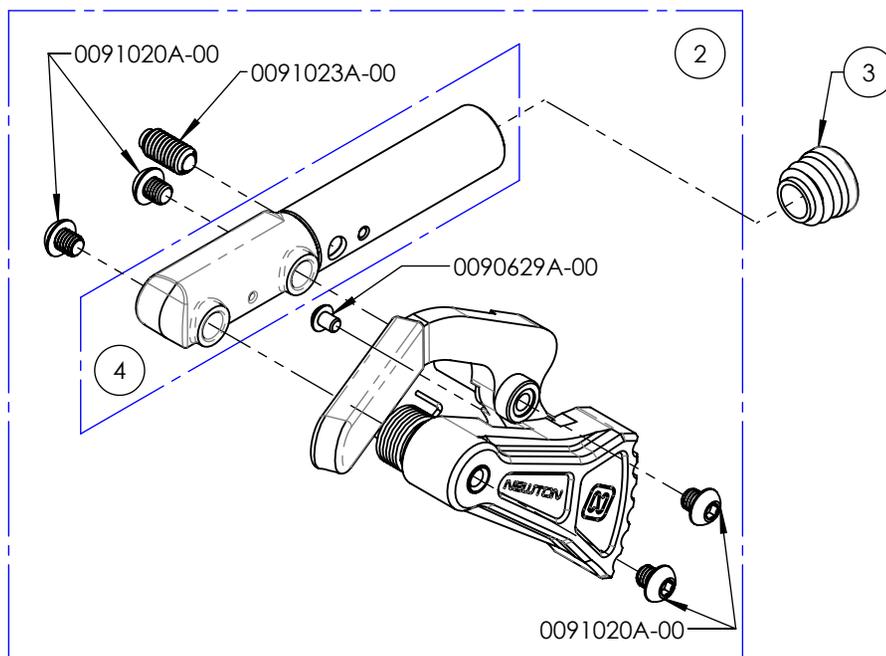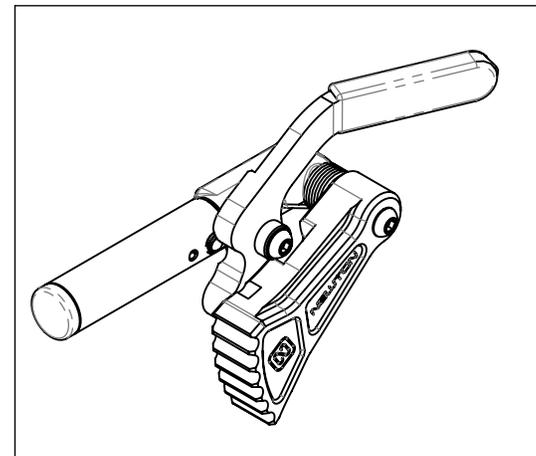


9003030A-00
 BLOCAGE ANTI-RECU - NEWTON, RAIL ALLONGÉ, GAUCHE

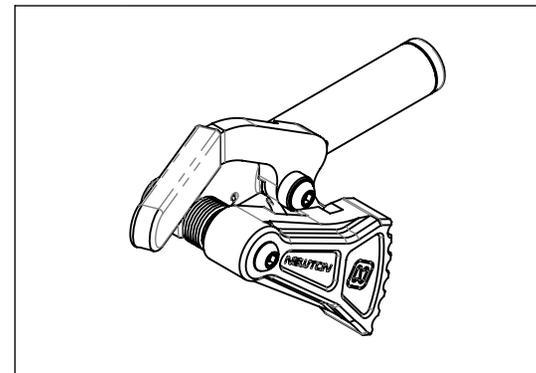


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9003031A 9003032A
BLOCAGE ANTI-RECU - NEWTON, LR, RALLONGE



No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9003031	9003032	EXTRA
1	0041514A-00	ANTI-RECU NEWTON & LR, DROITE - ASSY	1	-	-
2	0041515A-00	ANTI-RECU NEWTON & LR, GAUCHE - ASSY	-	1	-
3	0099701A-00	BOUCHON 3/4po	1	1	-
4	0041005A-00	RALLONGE LEVIER FREIN AMOVIBLE	1	1	-
5	0041075A-00	RAIL DE FREIN ANTI RECU NEWTON ALLONGÉE	-	-	1

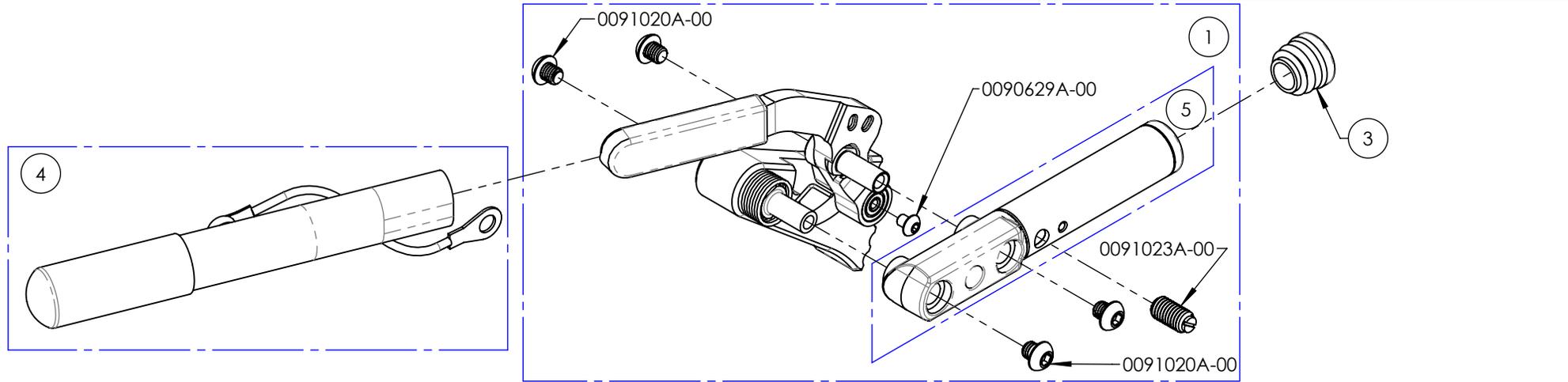

9003031A-00
 BLOCAGE ANTI-RECU - NEWTON, LR, RALLONGE DROITE

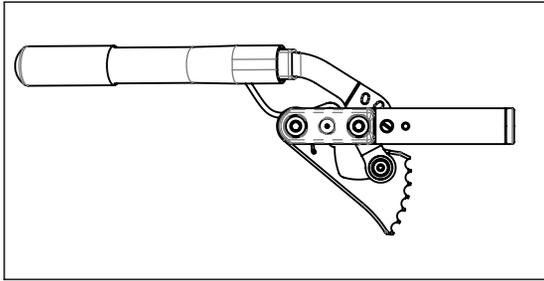

9003032A-00
 BLOCAGE ANTI-RECU - NEWTON, LR, RALLONGE GAUCHE

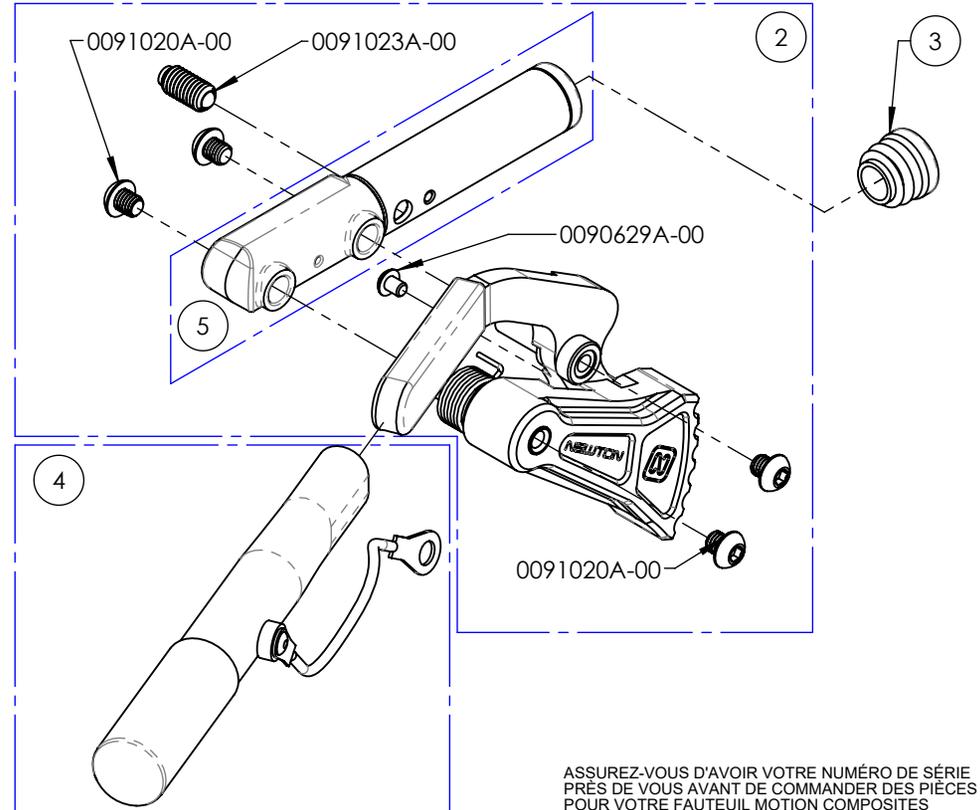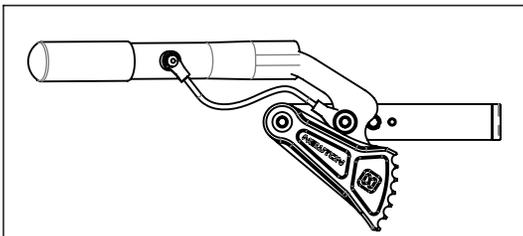


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


Catalogue blocages de roue
Blocage de roue - Bagues

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	9001212A-00	BAGUE - ULTRA-LÉGÈRE	1
2	0041501A-00	BAGUE DE FREIN - ASSEMBLAGE	1

FOR ALUMINUM FRAME

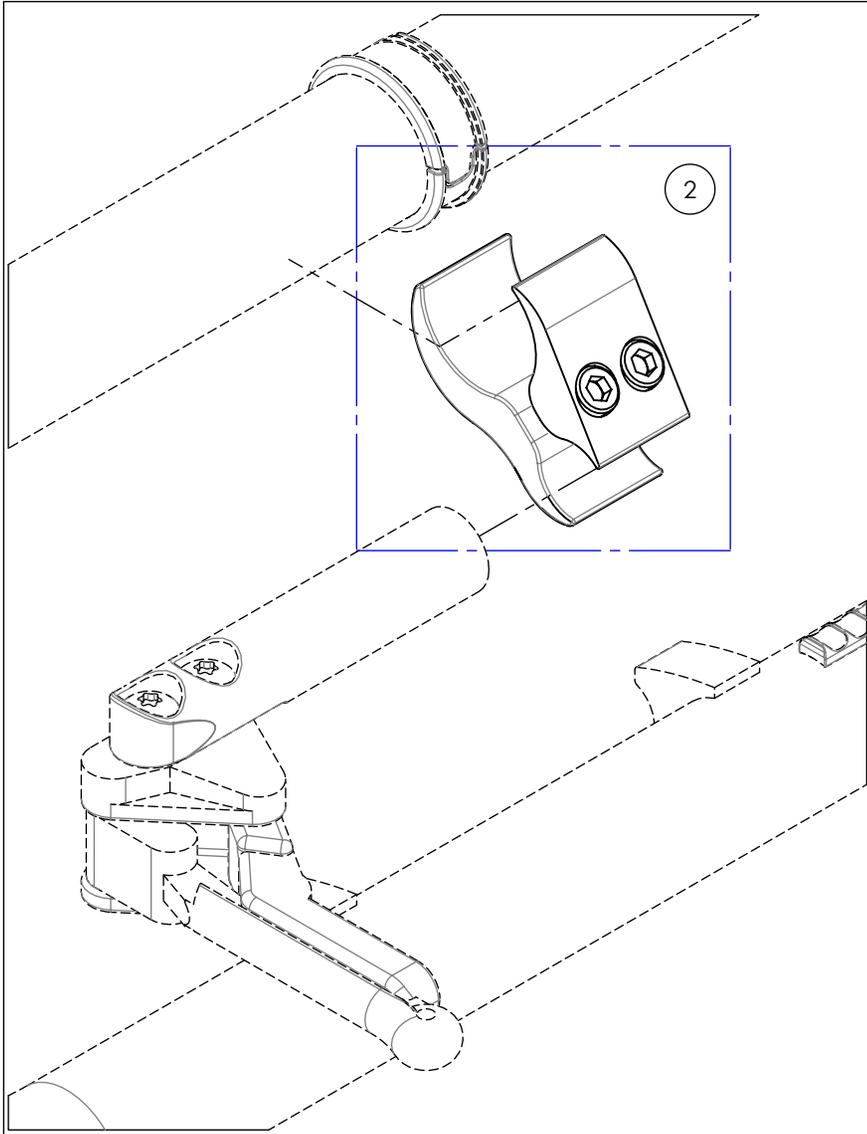





FOR CARBON FRAME

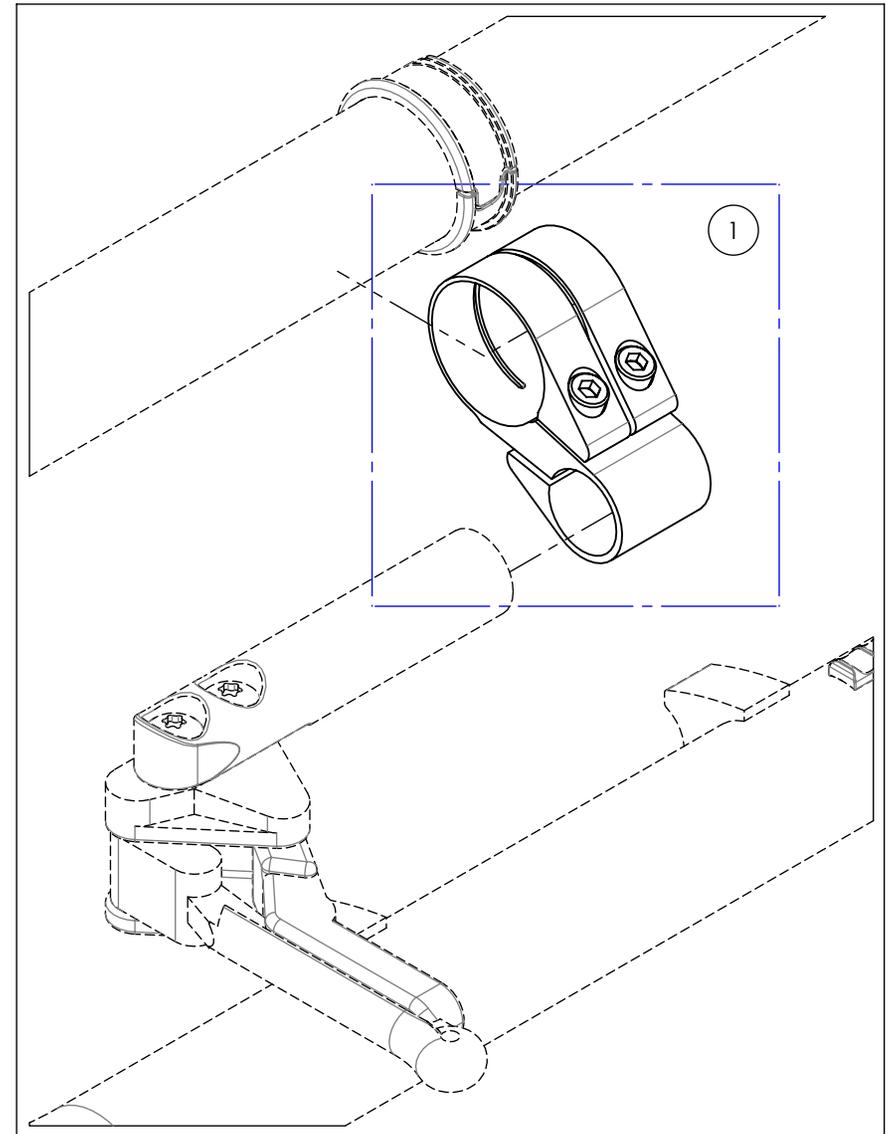

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES





Catalogue de blocages de roue
Blocage de roue - Anti-recul à rail allongé

No ITEM	No PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	9003029A-00	BLOCAGE ANTI-RECU - NEWTON, RAIL ALLONGÉ, DROITE	1
2	9003030A-00	BLOCAGE ANTI-RECU - NEWTON, RAIL ALLONGÉ, GAUCHE	1
3	9003031A-00	BLOCAGE ANTI-RECU - NEWTON, LR, RALLONGE DROITE	1
4	9003032A-00	BLOCAGE ANTI-RECU - NEWTON, LR, RALLONGE GAUCHE	1

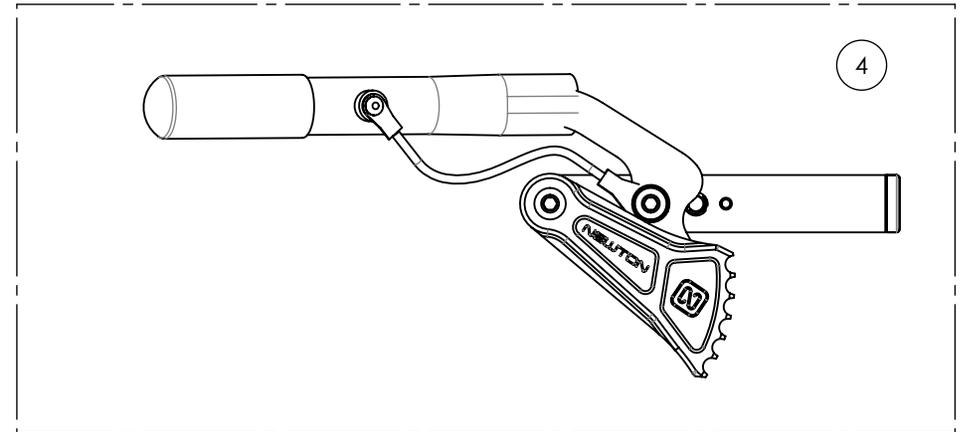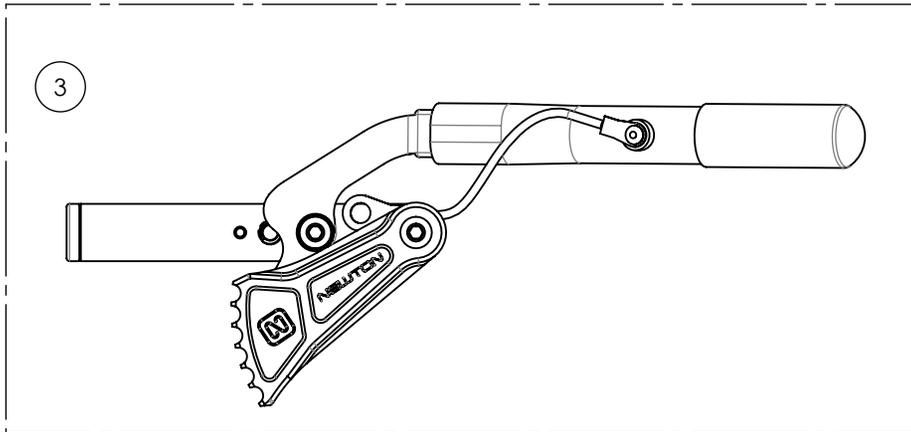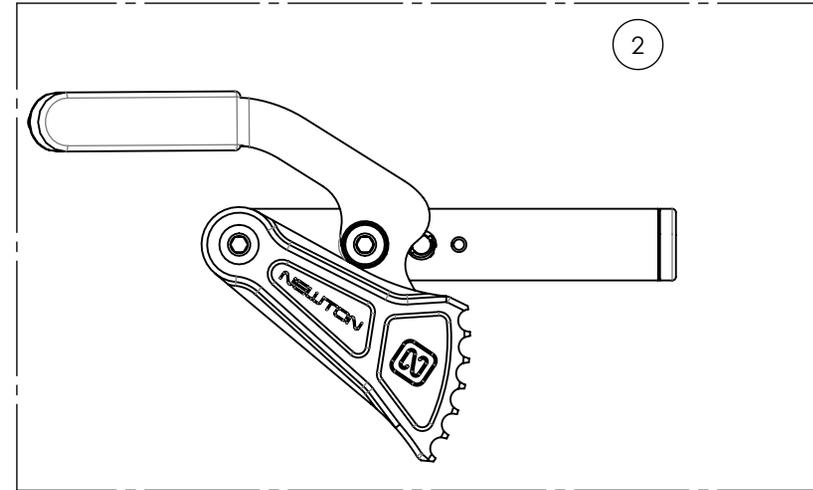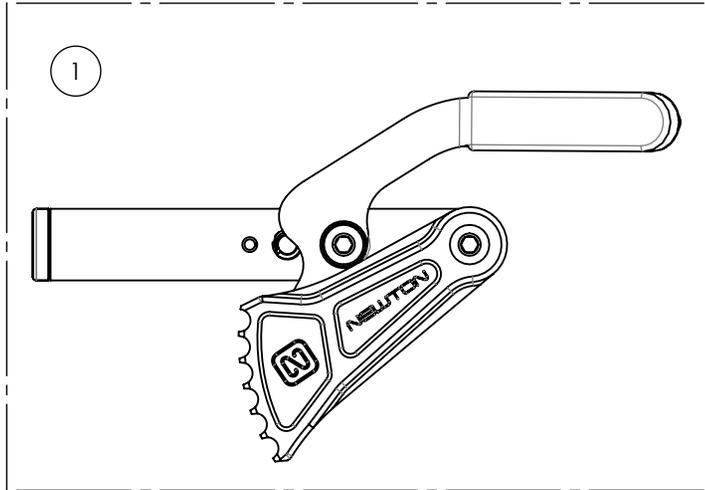

Catalogue de blocages de roue
Blocage de roue - Anti-recul

No ITEM	No PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	9001581A-00	BLOCAGE ANTI-RECU - NEWTON, DROITE	1
2	9001582A-00	BLOCAGE ANTI-RECU - NEWTON, GAUCHE	1
3	9001583A-00	BLOCAGE ANTI-RECU - NEWTON, RALLONGE, DROITE	1
4	9001584A-00	BLOCAGE ANTI-RECU - NEWTON, RALLONGE, GAUCHE	1



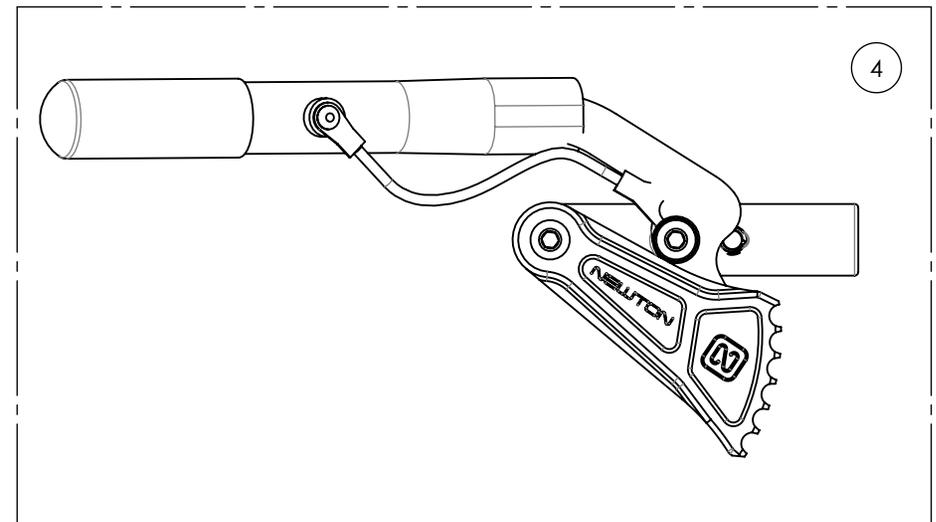
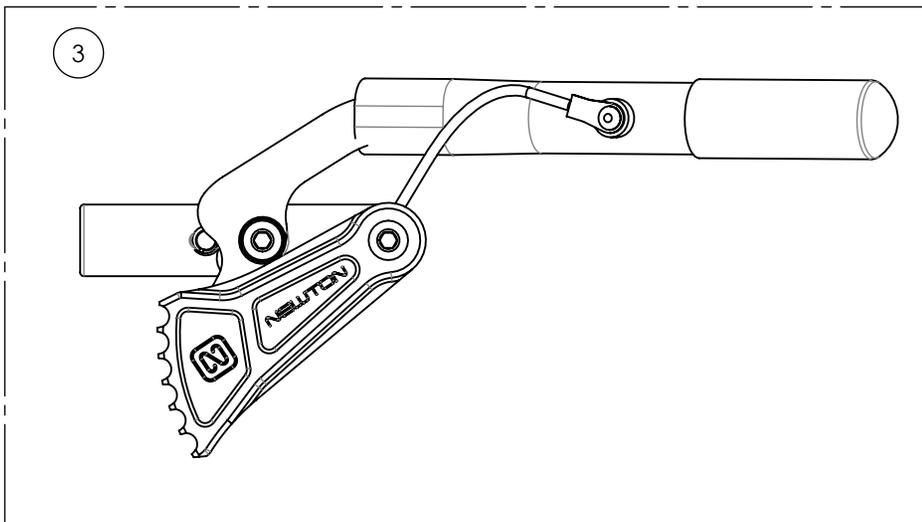
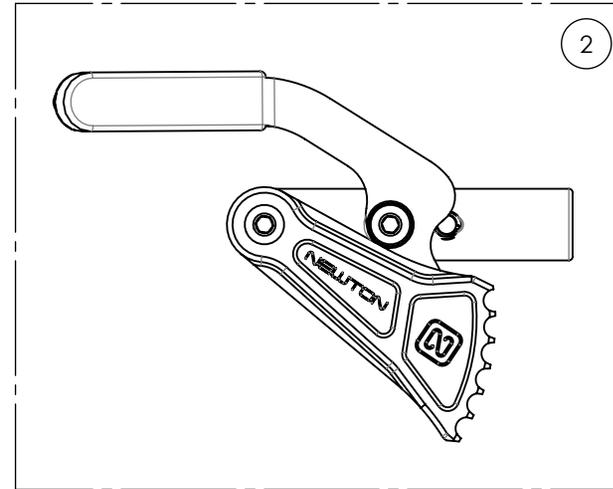
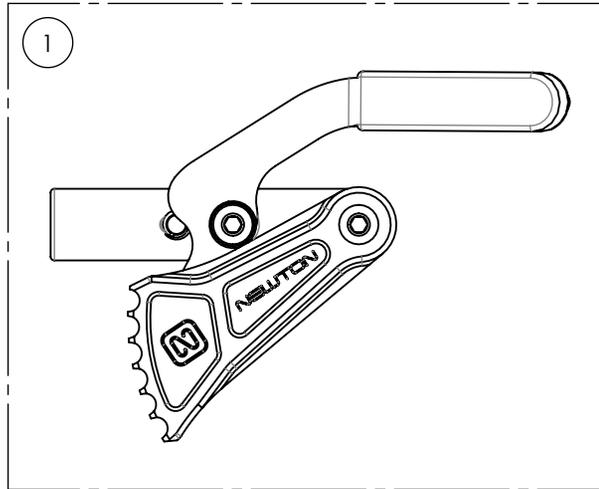


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

Catalogue de blocages de roue
Blocage de roue - Par poussée & par traction

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0041057A-00	BLOCAGE DE ROUE NEWTON PAR POUSSÉE, DROIT - ASSY	1
2	0041056A-00	BLOCAGE DE ROUE NEWTON PAR POUSSÉE, GAUCHE - ASSY	1
3	0041052A-00	BLOCAGE POUSSÉE NEWTON & RALL, DROITE - ASSY	1
4	0041051A-00	BLOCAGE POUSSÉE NEWTON & RALL, GAUCHE - ASSY	1
5	0041078A-00	BLOCAGE PAR TRACTION ALU, DROITE	1
6	0041079A-00	BLOCAGE PAR TRACTION ALU, GAUCHE	1
7	0041080A-00	BLOCAGE PAR TRACTION ALU + RALLONGE, DROITE	1
8	0041081A-00	BLOCAGE PAR TRACTION ALU + RALLONGE, GAUCHE	1
9	0041002A-00	FREIN BLOCAGE POUSSÉE (PAIRE)	1
10	0041013A-00	BLOCAGE PAR POUSSÉE ALU + RALLONGE (PAIRE)	1

REPLACÉ PAR
#0041056A-00 & #0041057A-00

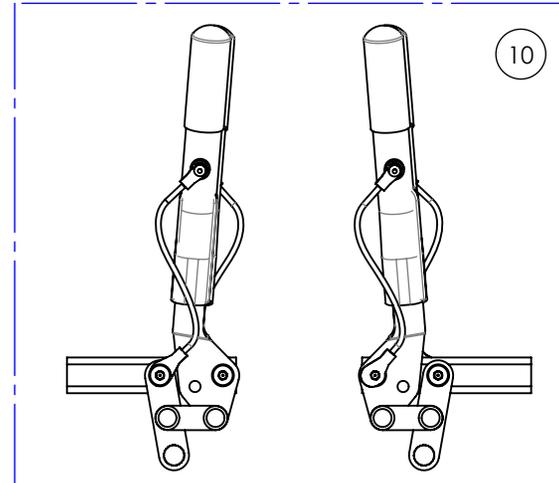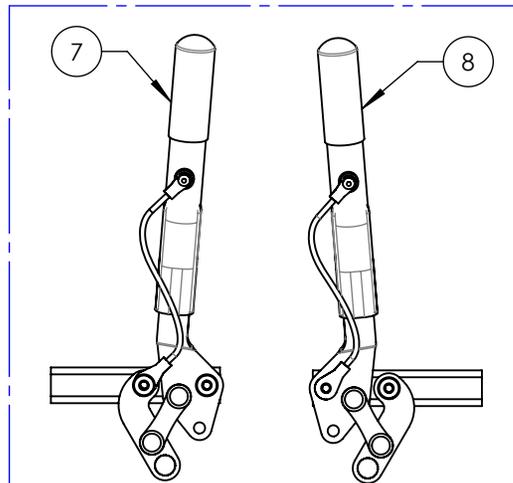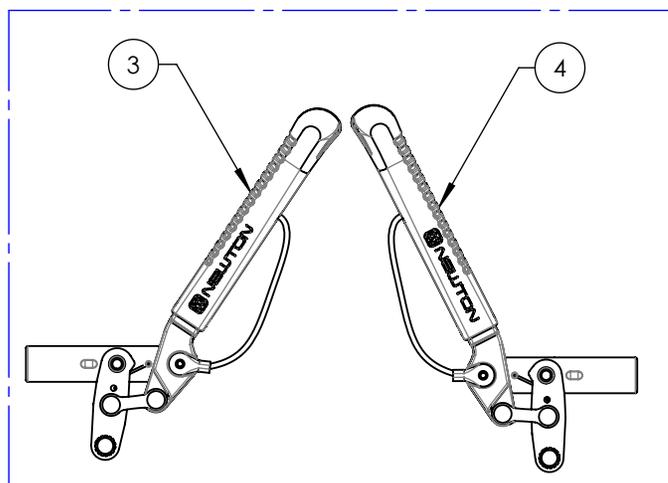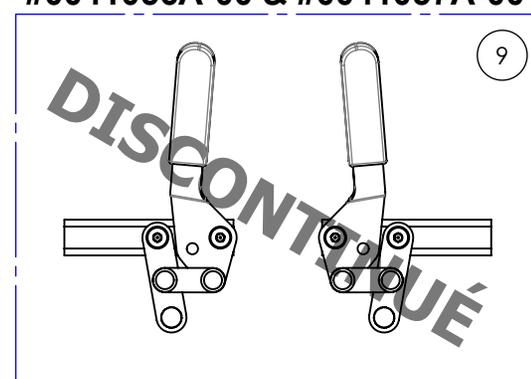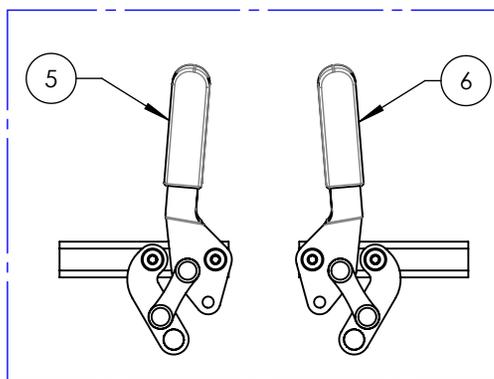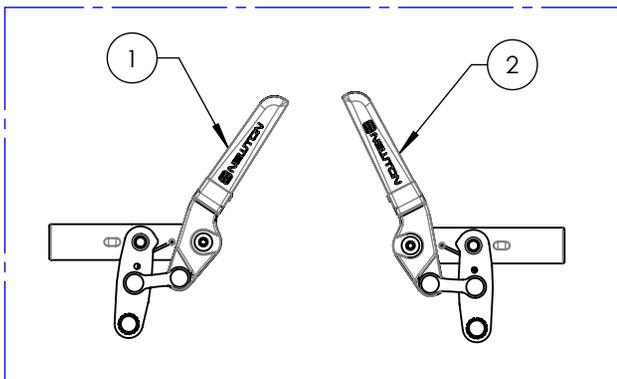






Note interne seulement pour 0041013A-00

- Si besoin 1 côté charger la paire -50%
- Remplacement sous garantie donner paire

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

Catalogue de blocages de roue
Blocage de roue - Par poussée et traction à rail allongée



No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0041516B-00	BLOCAGE PAR POUSSÉE - NEWTON, RAIL LONGUE, DROITE	1
2	0041517B-00	BLOCAGE PAR POUSSÉE - NEWTON, RAIL LONGUE, GAUCHE	1
3	0041076B-00	BLOCAGE PAR POUSSÉE - NEWTON, LR, RALLONGE, DROITE	1
4	0041077B-00	BLOCAGE PAR POUSSÉE - NEWTON, LR, RALLONGE, GAUCHE	1
5	0041714A-00	BLOCAGE PAR TRACTION ALU + RAIL ALLONGÉE, DROITE	1
6	0041715A-00	BLOCAGE PAR TRACTION ALU + RAIL ALLONGÉE, GAUCHE	1
7	0041712A-00	BLOCAGE PAR TRACTION ALU + RAIL ALL + RALL, DROITE	1
8	0041713A-00	BLOCAGE PAR TRACTION ALU + RAIL ALL + RALL, GAUCHE	1
9	0041503A-00	BLOCAGE PAR POUSSÉE ALU + RAIL ALL + RALL	1

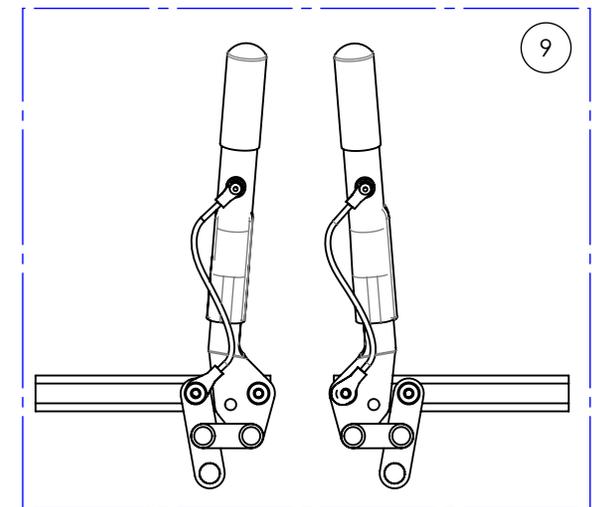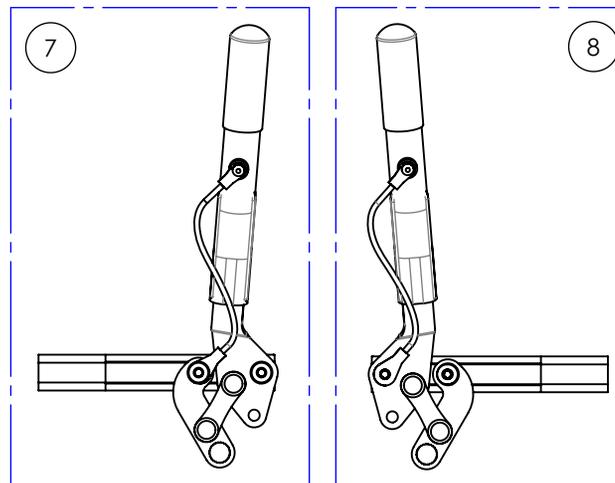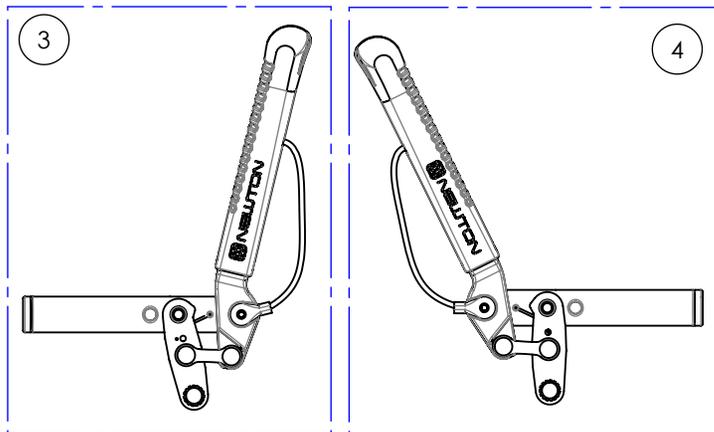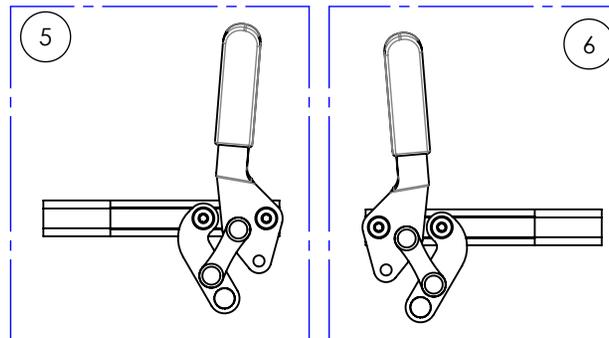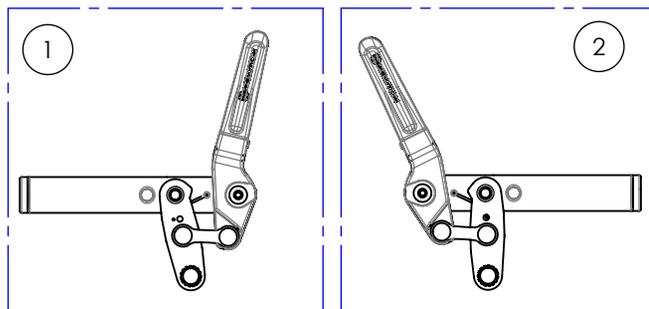

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

Catalogue de blocages de roue
Blocage de roue - Ciseaux


No ITEM	No PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0041123A-00	BLOCAGE DE ROUE CISEAUX MBL, DROITE	1
2	0041122A-00	BLOCAGE DE ROUE CISEAUX MBL, GAUCHE	1

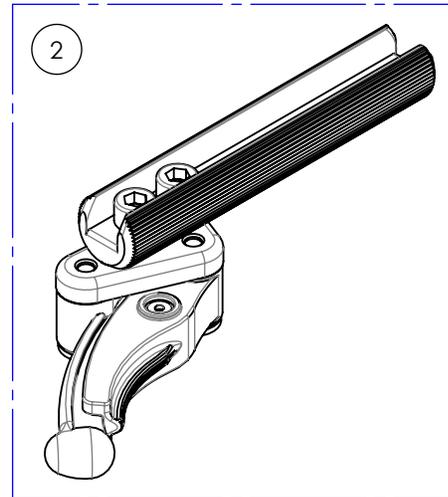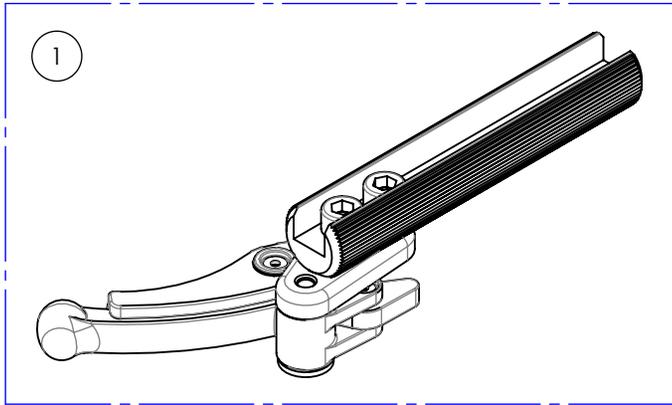


**APPLICABLE SUR LES FAUTEUILS À
PARTIR DU NUMÉRO DE SÉRIE #72827**

0007400A
APPUI-BRAS - TYPE T, DROITE, 6-10 po


0007400A -				
NO. ITEM	NO. PIÈCE	DESCRIPTION	00/QTÉ	01/QTÉ
1	0003521B-00	APPUIE-BRAS T PETIT 6-10po, DROITE	1	1
2	9010394A-00	STRUCTURE - GARNITURE STD, 8-12po, COURTE, DROITE	1	-
3	9010396A-00	STRUCTURE - GARNITURE STD, 8-12po, LONGUE, DROITE	-	1

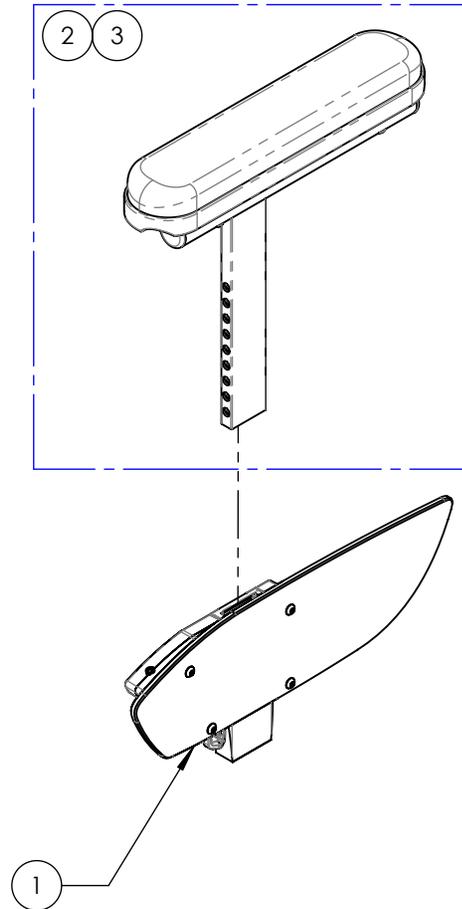

0007400A-00
 APPUI-BRAS - TYPE T, DROITE, 6-10 po, COURT


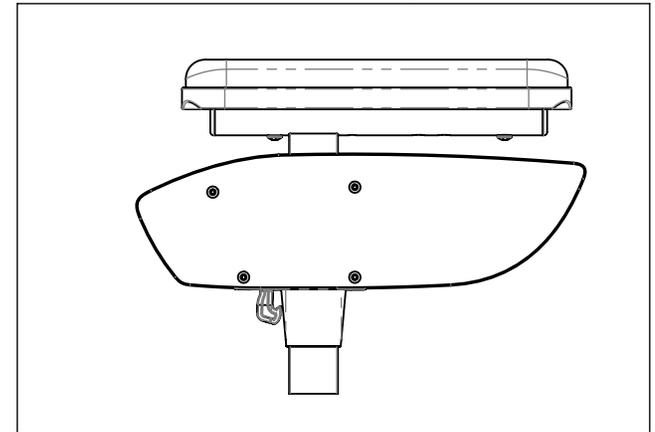


0007400A-01
 APPUI-BRAS - TYPE T, DROITE, 6-10 po, LONG

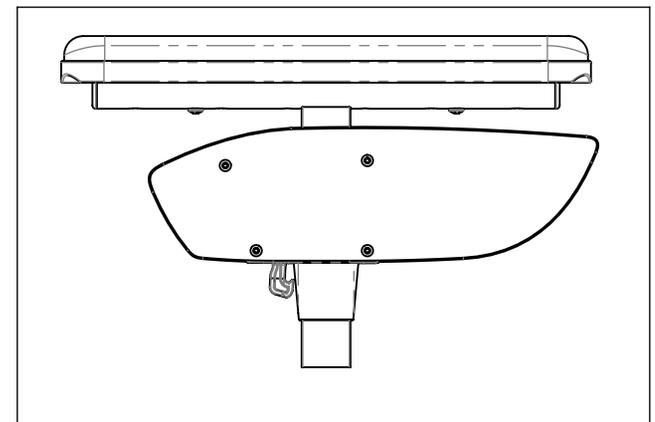


0007402A
APPUI-BRAS - TYPE T, GAUCHE, 6-10Po


0007402A -				
NO. ITEM	NO. PIÈCE	DESCRIPTION	00/QTÉ	01/QTÉ
1	0003521B-01	APPUIE-BRAS T PETIT 6-10po, GAUCHE	1	1
2	9010398A-00	STRUCTURE - GARNITURE STD, 8-12po, COURTE, GAUCHE	1	-
3	9010400A-00	STRUCTURE - GARNITURE STD, 8-12po, LONGUE, GAUCHE	-	1

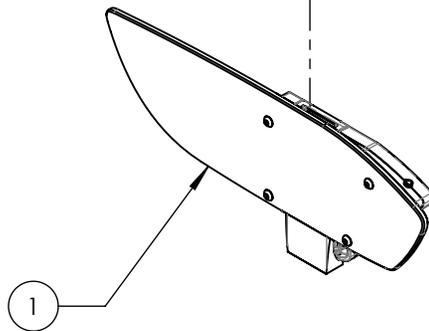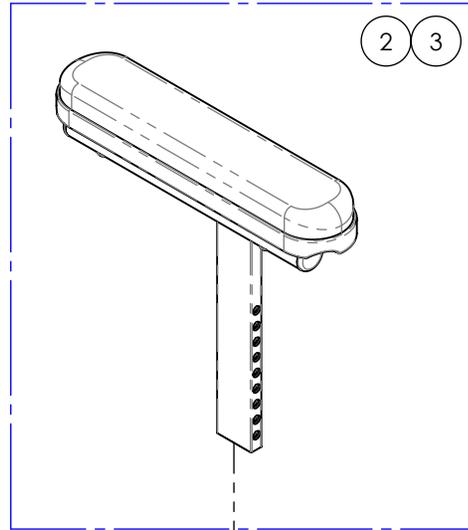



0007402A-00
 APPUI-BRAS - TYPE T, GAUCHE, 6-10 po, COURT

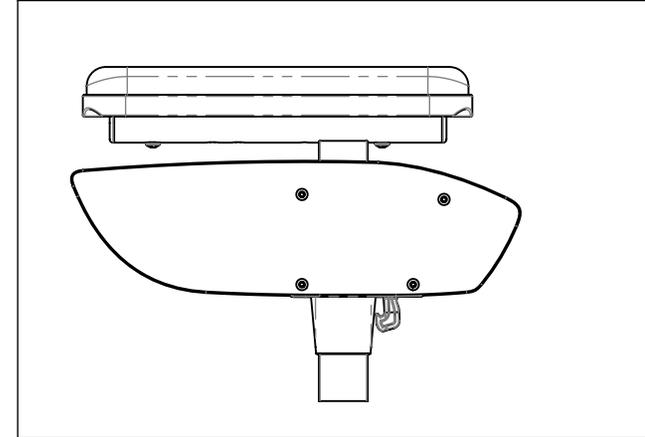

0007402A-01
 APPUI-BRAS - TYPE T, GAUCHE, 6-10 po, LONG


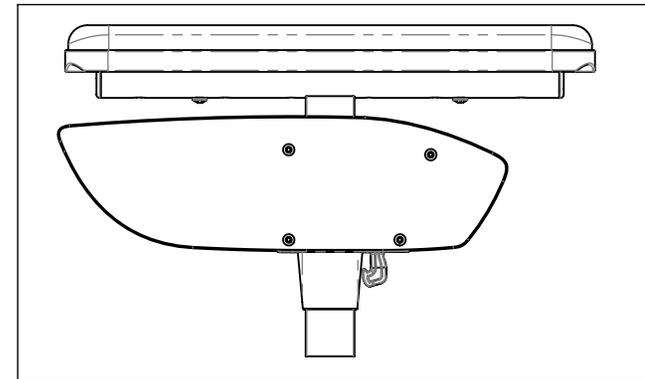


REVISIONS			
REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
a.1	RELEASE FOR PRODUCTION	2015-03-16	VB
a.3	REVERSED PART 33707	2018-09-19	PLS
a.4	CORRECT REVISION ERROR OF PART 033135	2018-10-18	PLS

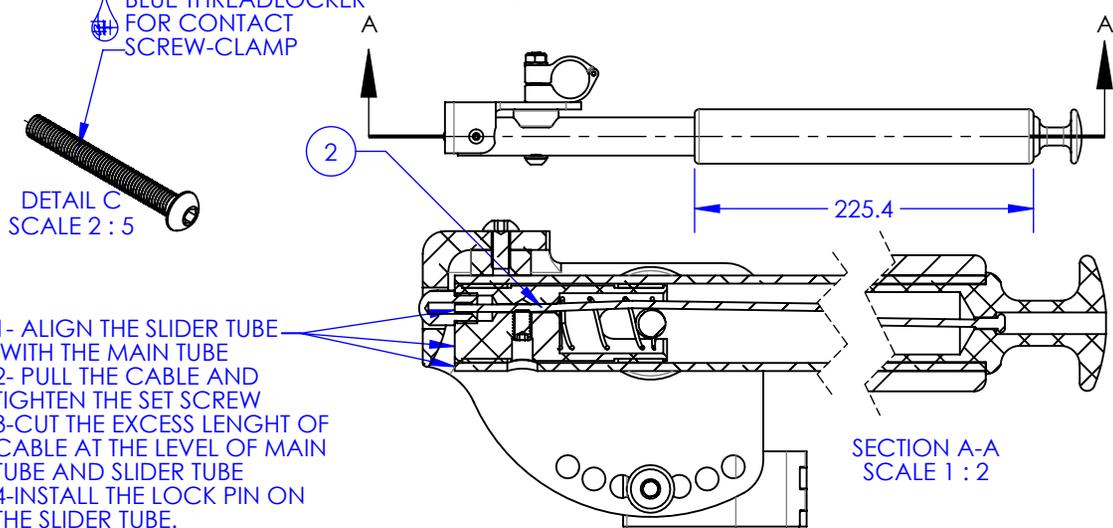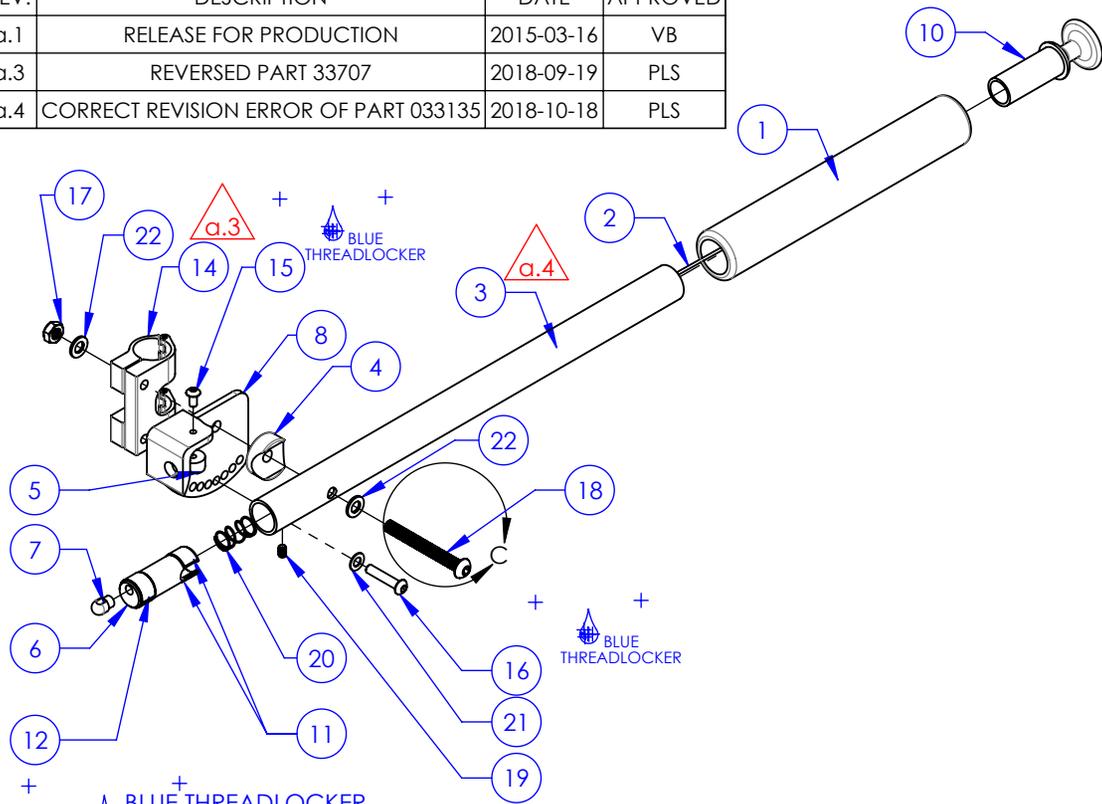

- 1- ALIGN THE SLIDER TUBE WITH THE MAIN TUBE
- 2- PULL THE CABLE AND TIGHTEN THE SET SCREW
- 3-CUT THE EXCESS LENGTH OF CABLE AT THE LEVEL OF MAIN TUBE AND SLIDER TUBE
- 4-INSTALL THE LOCK PIN ON THE SLIDER TUBE.

ITEM NO.	PART NO.	REV.	DESCRIPTION	033504 /QTY.	033503 /QTY.
1	0033049A-00	0	SWING AWAY TUBULAR FOAM GRIP	1	1
2	0033134A-00	0	FLIP UP I ARMREST - CABLE	1	1
3	0033135A-00	2	a.4 FLIP UP I ARMREST - MAIN TUBE	1	1
4	0033136A-00	1	FLIP UP I ARMREST - 25mm COVED WASHER	1	1
5	0033141A-00	1	FLIP UP I ARMREST - STOPPER	1	1
6	0033142A-00	1	FLIP UP I ARMREST - SLIDER TUBE	1	1
7	0033143A-00	1	FLIP UP I ARMREST - LOCK PIN	1	1
8	0033144A-00	1	FLIP UP I ARMREST - RIGHT PIVOT PLATE	-	1
9	0033145A-00	1	FLIP UP I ARMREST - LEFT PIVOT PLATE	1	-
10	0033146A-00	1	FLIP UP I ARMREST - PULL KNOB	1	1
11	0033148A-00	1	FLIP UP I ARMREST - 20mm UHMW SELF ADHESIVE TAPE	2	2
12	0033149A-00	1	FLIP UP I ARMREST - 58mm UHMW SELF ADHESIVE TAPE	1	1
13	0033706A-00	0	FLIP UP I ARMREST CLAMP - ASSEMBLY (M) RIGHT	1	-
14	0033707A-00	0	FLIP UP I ARMREST CLAMP - ASSEMBLY (M) LEFT	-	1
15	0090643A-00	1	BUTTON CAP SCREW M5x0.8x10mm L	1	1
16	0090664A-00	1	BUTTON CAP SCREW M6x1x30mm L	1	1
17	0090990A-00	0	THin LOCKNUT M8x1.25	1	1
18	0091022A-00	0	BUTTON CAP SCREW M8x1.25x70mm L	1	1
19	0091025A-00	0	SET SCREW M5x0.8x8mm L	1	1
20	0091028A-00	0	COMP SPRING, 25 L, 14 OD, 4.5NA, 1.0mm WIRE	1	1
21	0099560A-00	0	FLAT WASHER 1/4in, 17/64 ID, 1/2 OD, .032 THK	1	1
22	0099590A-00	0	FLAT WASHER 5/16in, 21/64 ID, 19/32 OD, .062 THK	2	2

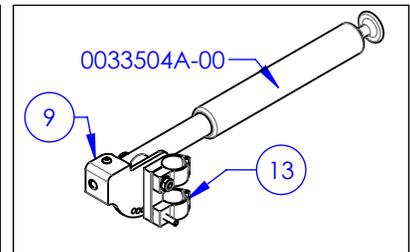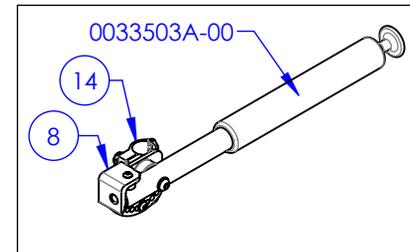

DESCRIPTION: FLIP UP I ARMREST - ASSY			
PART No: 0033503A_0033504A	REV: 4	DRAWING STATE: Level 3	OLD PART No:
DRAWN BY: PLS DATE: 2018-10-18	VERIFIED BY: MAB DATE: 2015-08-14	APPROVED BY: PLS DATE: 2018-10-18	

PROJECTION:	
TOLERANCES:	X : ± 0.40 X.X : ± 0.25 X.XX : ± 0.125



SAMPLE MUST BE APPROVED BY MOTION COMPOSITES PRIOR TO START PRODUCTION.

A PART MUST BE CLEAN. SUPPLIER MUST CLEAN SHARP EDGES.
B HARDWARE COLOR:
C STANDARD TORQUE FOR HEX SOCKET DRIVE:
- 5 mm : 12 Nm
- 4 mm : 7 Nm
- 3 mm : 4 Nm


PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF MOTION COMPOSITES INC. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF MOTION COMPOSITES INC. IS PROHIBITED. PENDING PATENT

9001299B_9001300B
APPUI-BRAS - TYPE T & U, DROIT, 8-12 po


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9001299	9001300
1	9010394B-00	STRUCTURE - GARNITURE STD, 8-12po, COURTE, DROITE	1	-
2	9010396B-00	STRUCTURE - GARNITURE STD, 8-12po, LONGUE, DROITE	-	1
3	0033554B-00	APPUI BRAS V2 - ASSEMBLAGE	1	1

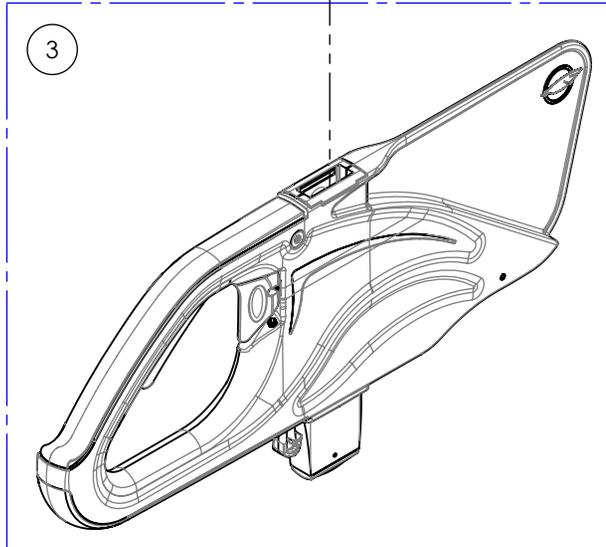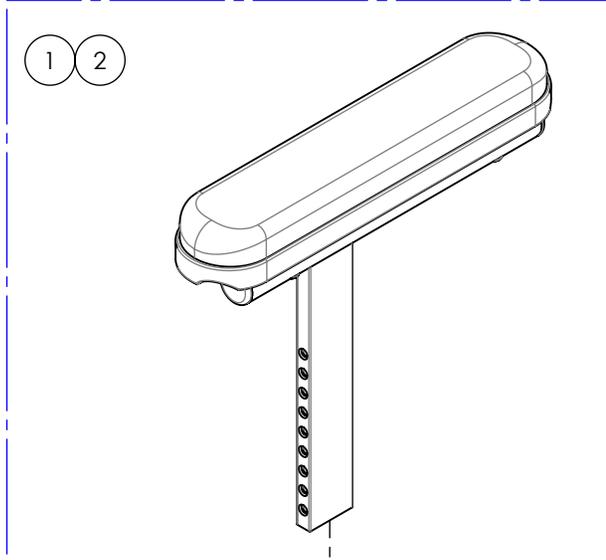

9001299B-00
 APPUI-BRAS - TYPE T & U, DROITE, 8-12po, COURT


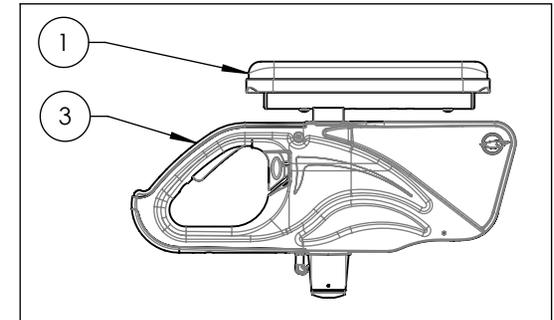


9001300B-00
 APPUI-BRAS - TYPE T & U, DROITE, 8-12po, LONG

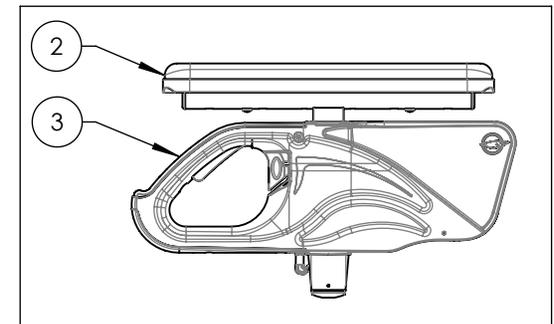


9001301B 9001302B
APPUI-BRAS - TYPE T & U, DROIT, 10-14 po


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9001301	9001302
1	9010395B-00	STRUCTURE - GARNITURE STD, 10-14po, COURTE, DROITE	1	-
2	9010397B-00	STRUCTURE - GARNITURE STD, 10-14po, LONGUE, DROITE	-	1
3	0033554A-00	APPUI BRAS V2 - ASSEMBLAGE	1	1

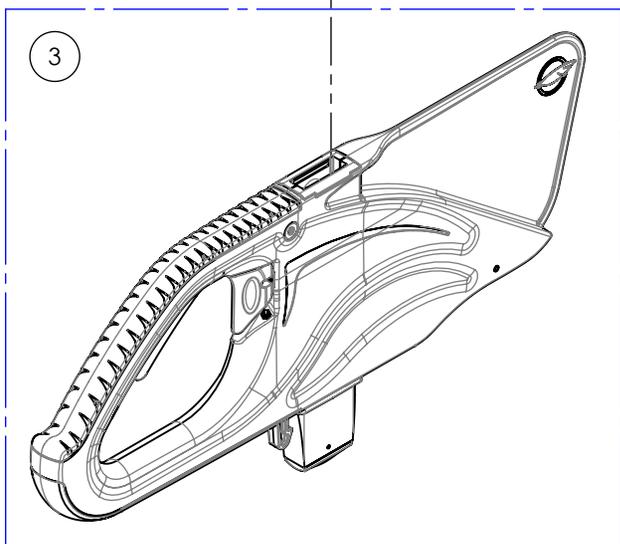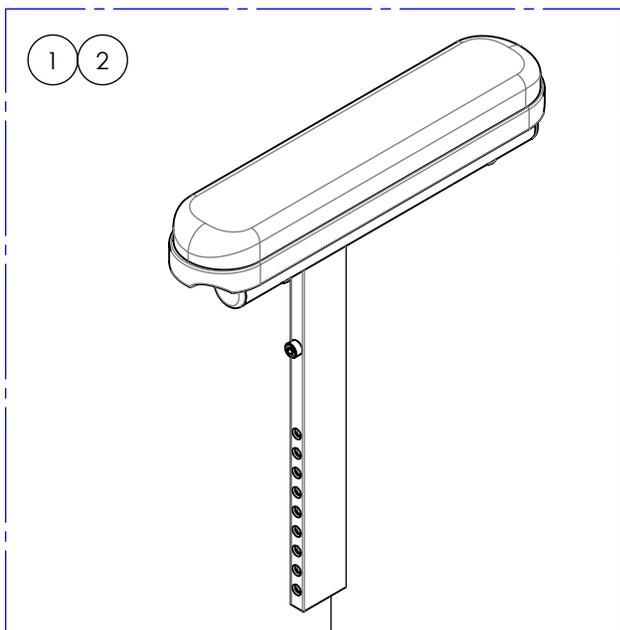

9001301B-00
 APPUI-BRAS - TYPE T & U, DROITE, 10-14po, COURT

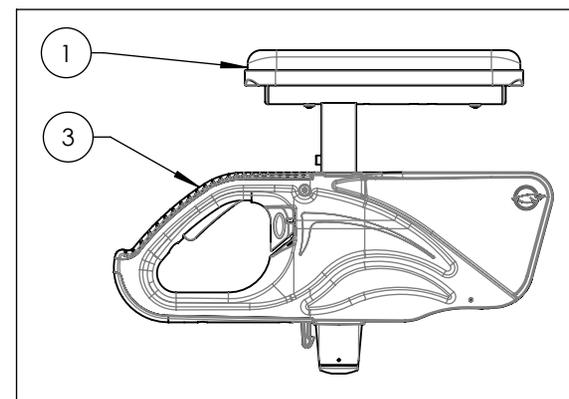



9001302B-00
 APPUI-BRAS - TYPE T & U, DROITE, 10-14po, LONG

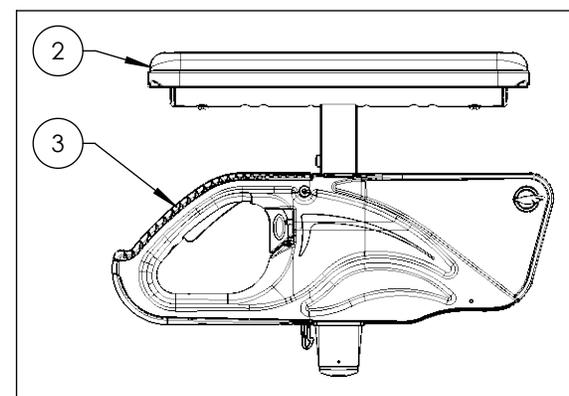


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9001303B_9001304B
APPUI-BRAS - TYPE T & U, GAUCHE, 8-12 po


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9001303	9001304
1	9010398B-00	STRUCTURE - GARNITURE STD, 8-12po, COURTE, GAUCHE	1	-
2	9010400B-00	STRUCTURE - GARNITURE STD, 8-12po, LONGUE, GAUCHE	-	1
3	0033554A-00	APPUI BRAS V2 - ASSEMBLAGE	1	1

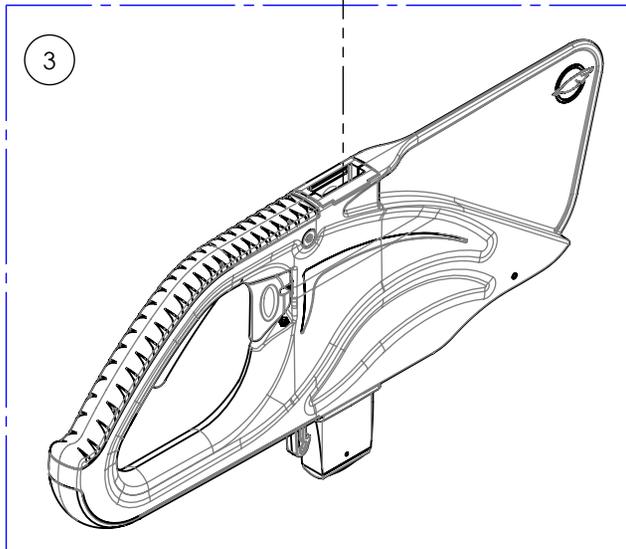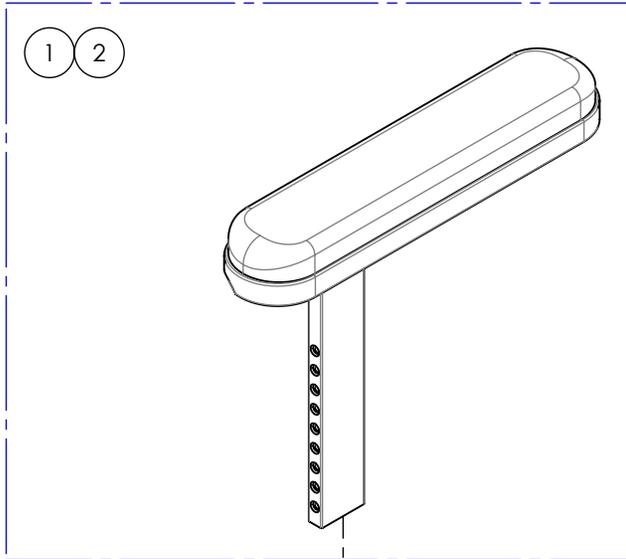

9001303B-00
 APPUI-BRAS - TYPE T & U, GAUCHE, 8-12po, COURT

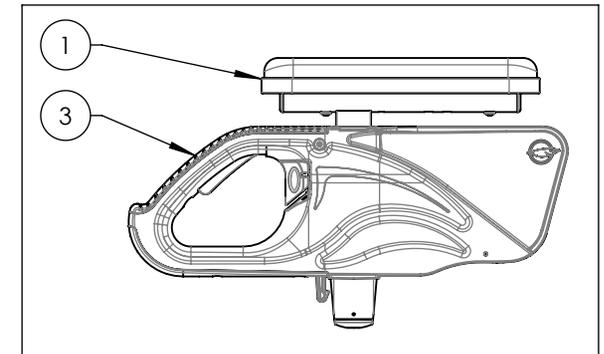



9001304B-00
 APPUI-BRAS - TYPE T & U, GAUCHE, 8-12po, LONG

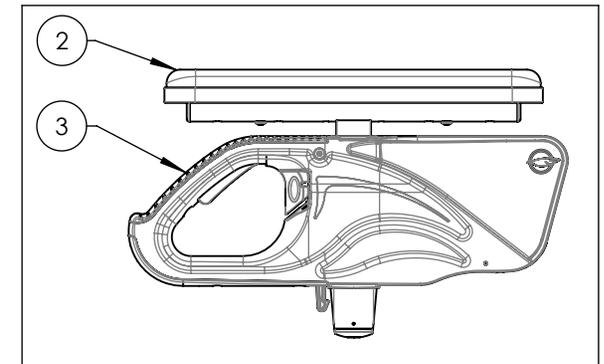


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9001305B_9001306B
APPUI-BRAS - TYPE T & U, GAUCHE, 10-14 po


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9001305	9001306
1	9010399B-00	STRUCTURE - GARNITURE STD, 10-14po, COURTE, GAUCHE	1	-
2	9010401B-00	STRUCTURE - GARNITURE STD, 10-14po, LONGUE, GAUCHE	-	1
3	0033554A-00	APPUI BRAS V2 - ASSEMBLAGE	1	1

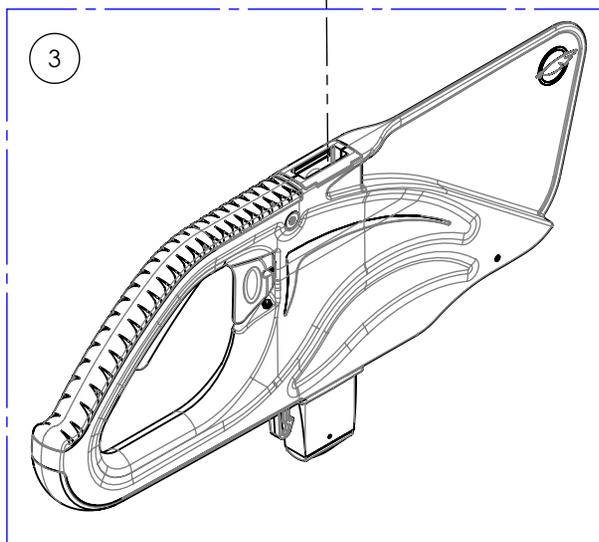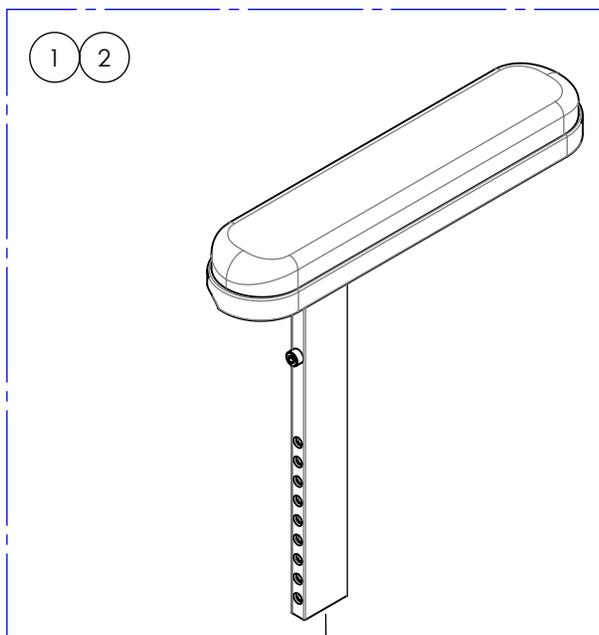

9001305B-00
 APPUI-BRAS - TYPE T & U, GAUCHE, 10-14po, COURT

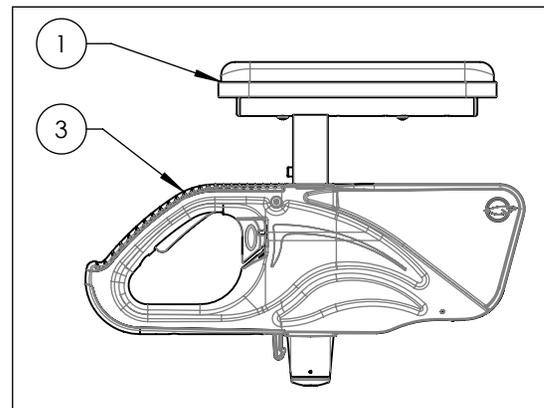



9001306B-00
 APPUI-BRAS - TYPE T & U, GAUCHE, 10-14po, LONG

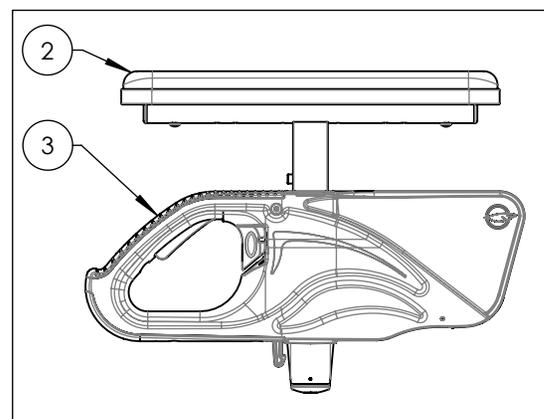

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9001308A-00
APPUI-BRAS - TYPE L, DROITE, TUBULAIRE



No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0033552A-00	ÉCROU FENDU APPUI BRAS L - ASSEMBLAGE (M)	1
2	0033035B-00	APPUI BRAS L DROIT	1
3	0033049A-00	GANITURE TUBULAIRE APPUI BRAS L	1
4	0099702A-00	BOUCHON 1po (ALU)	1

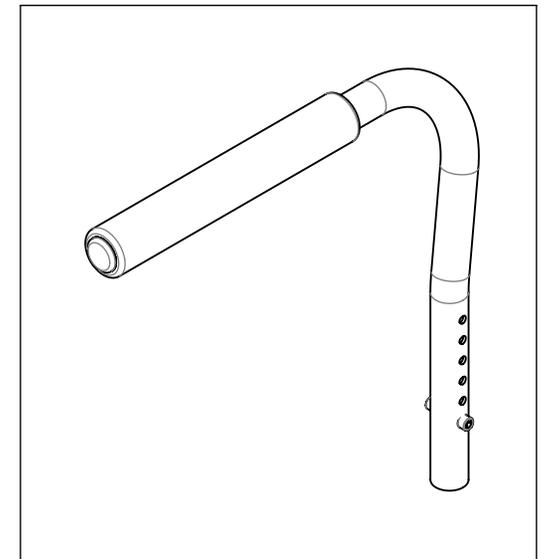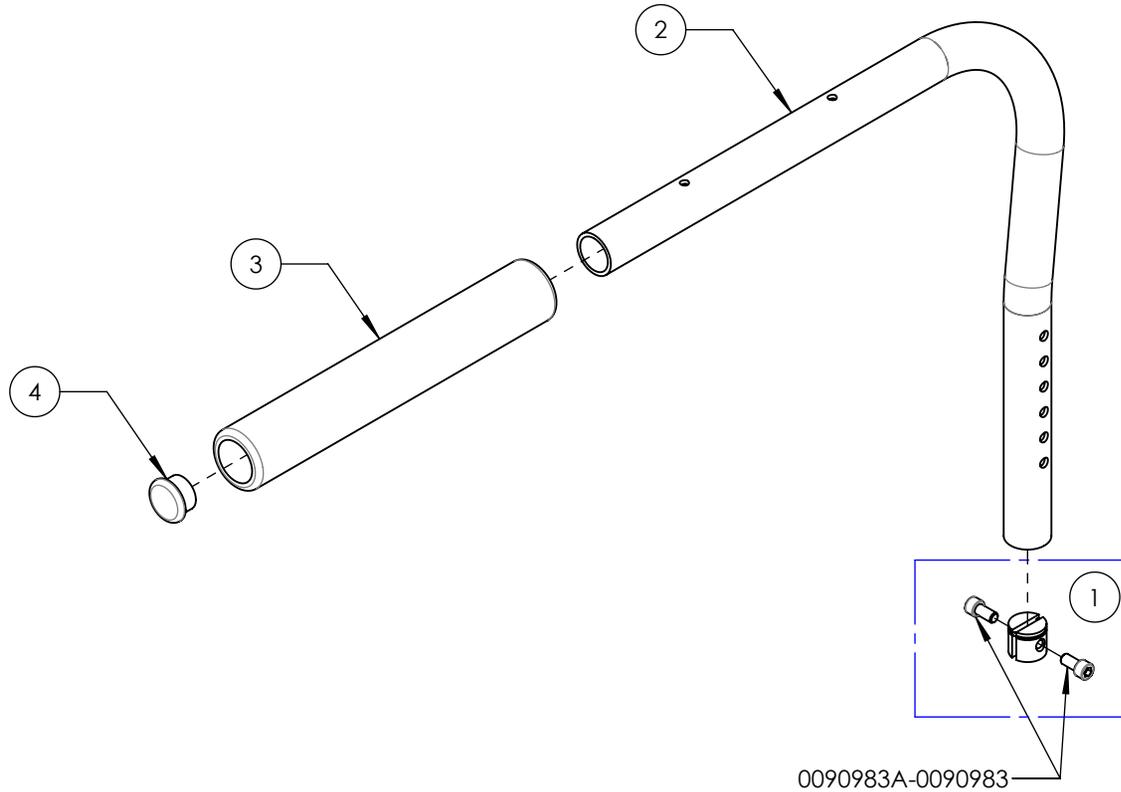

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9001309A-00
APPUI-BRAS - TYPE L, GAUCHE, TUBULAIRE



No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ.
1	0033552A-00	ÉCROU FENDU APPUI BRAS L - ASSEMBLAGE (M)	1
2	0033049A-00	GANITURE TUBULAIRE APPUI BRAS L	1
3	0099702A-00	BOUCHON 1po (ALU)	1
4	0033036B-00	APPUI BRAS L GAUCHE	1

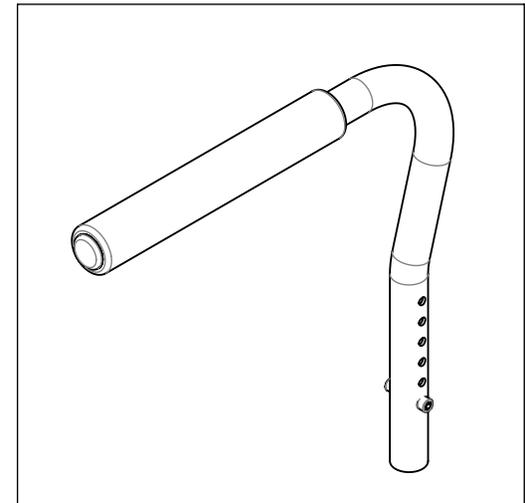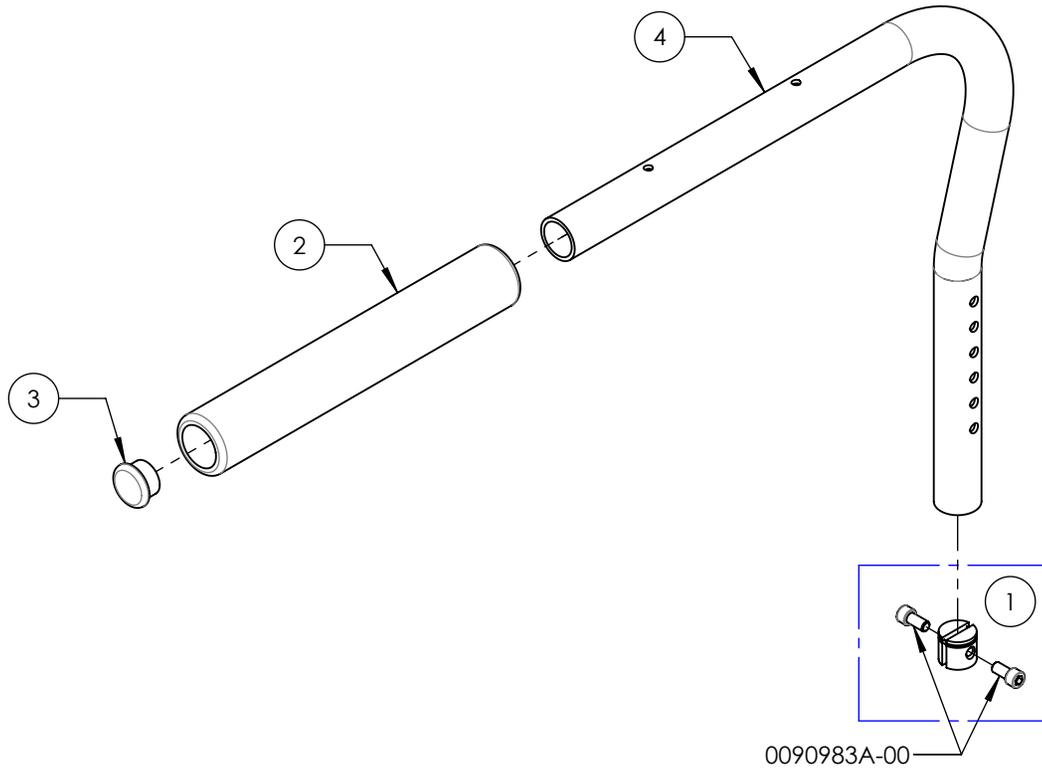

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9001310A-00
APPUI-BRAS - TYPE L, DROITE, GARNITURE COURTE



No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0033552A-00	ÉCROU FENDU APPUI BRAS L - ASSEMBLAGE (M)	1
2	0033035B-00	APPUI BRAS L DROIT	1
3	0033038B-00	GARNITURE APPUI BRAS COURT	1
4	0099013A-00	VIS TÊTE CYL LARGE PHILLIPS #10-32x1.5po L	2
5	0099702A-00	BOUCHON 1po (ALU)	1

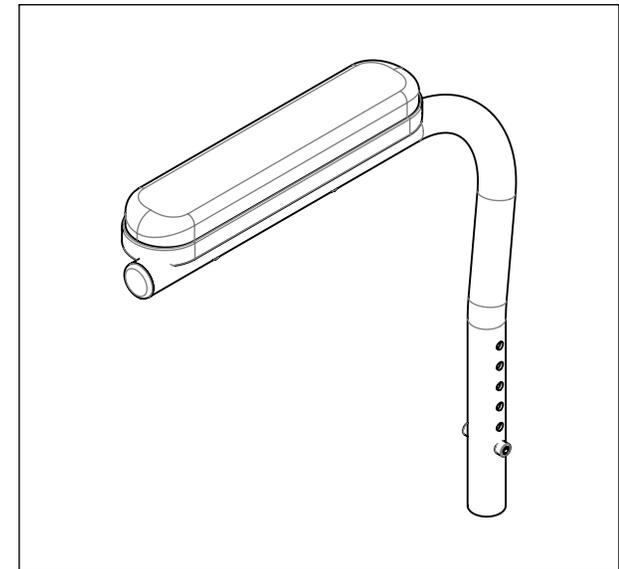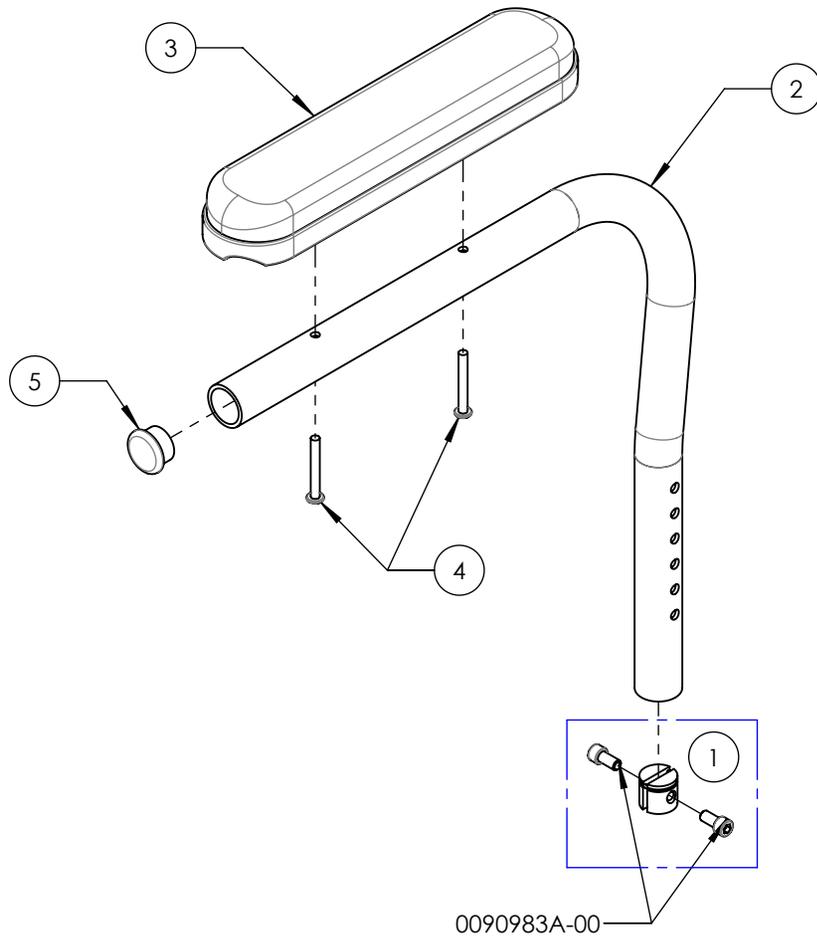

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9001311A-00
APPUI-BRAS - TYPE L, GAUCHE, GARNITURE COURTE


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ.
1	0033552A-00	ÉCROU FENDU APPUI BRAS L - ASSEMBLAGE (M)	1
2	0033038B-00	GARNITURE APPUI BRAS COURT	1
3	0033036B-00	APPUI BRAS L GAUCHE	1
4	0099013A-00	VIS TÊTE CYL LARGE PHILLIPS #10-32x1.5po L	2
5	0099702A-00	BOUCHON 1po (ALU)	1

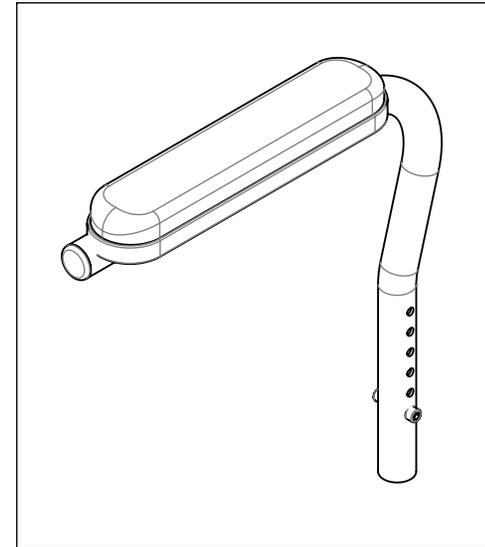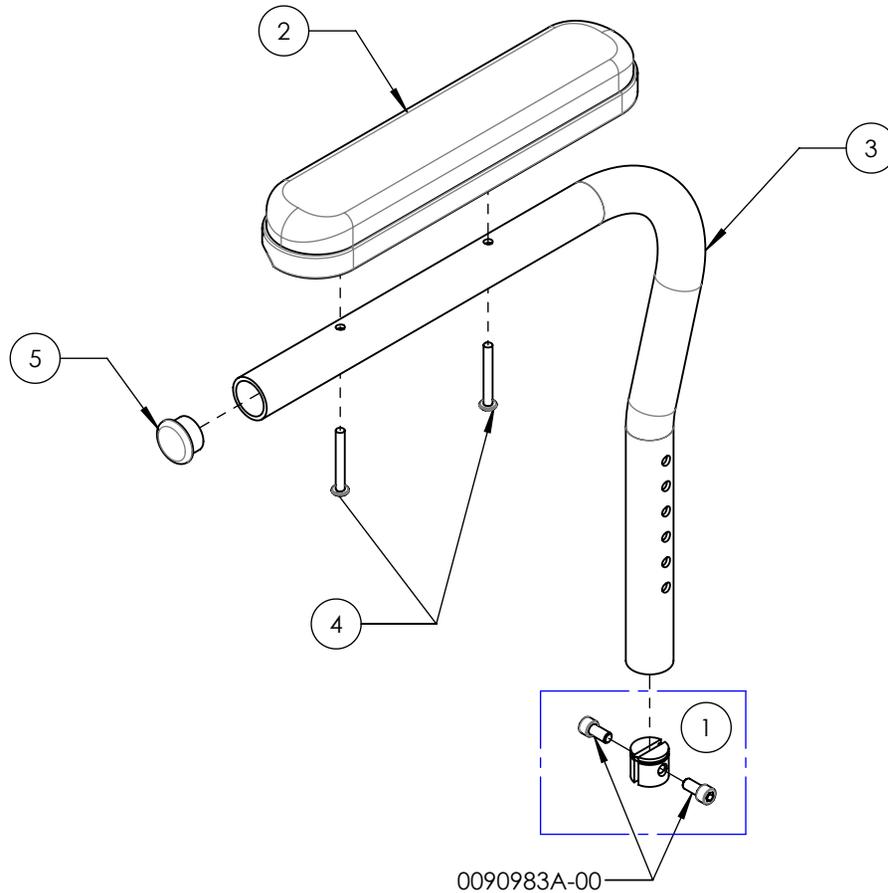

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


9002932A-00
GARNITURE - GEL, LONGUE

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0033077A-00	GARNITURE APPUI BRAS EN GEL OVATION 2x14po, LONG	1
2	0033068A-00	RONDELLE DOMÉE 1/4POX1-1/4po PLASTIQUE	4
3	0099013A-00	VIS TÊTE CYL LARGE PHILLIPS #10-32x1.5po L	4

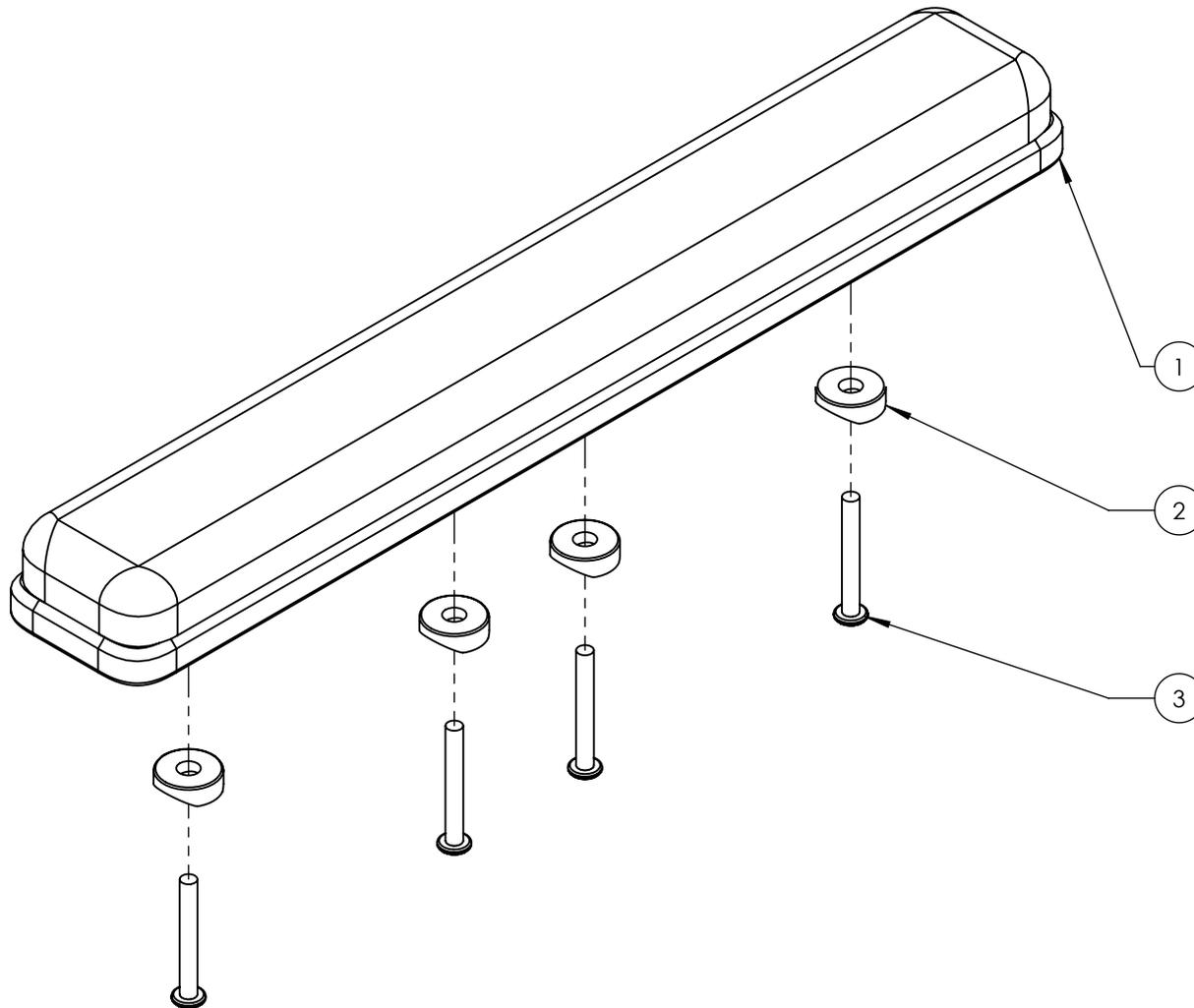


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9002933B 9002934B
APPUI-BRAS - STRUCTURE APPUI-BRAS V2, GARNITURE LONGUE EN GEL, DROIT

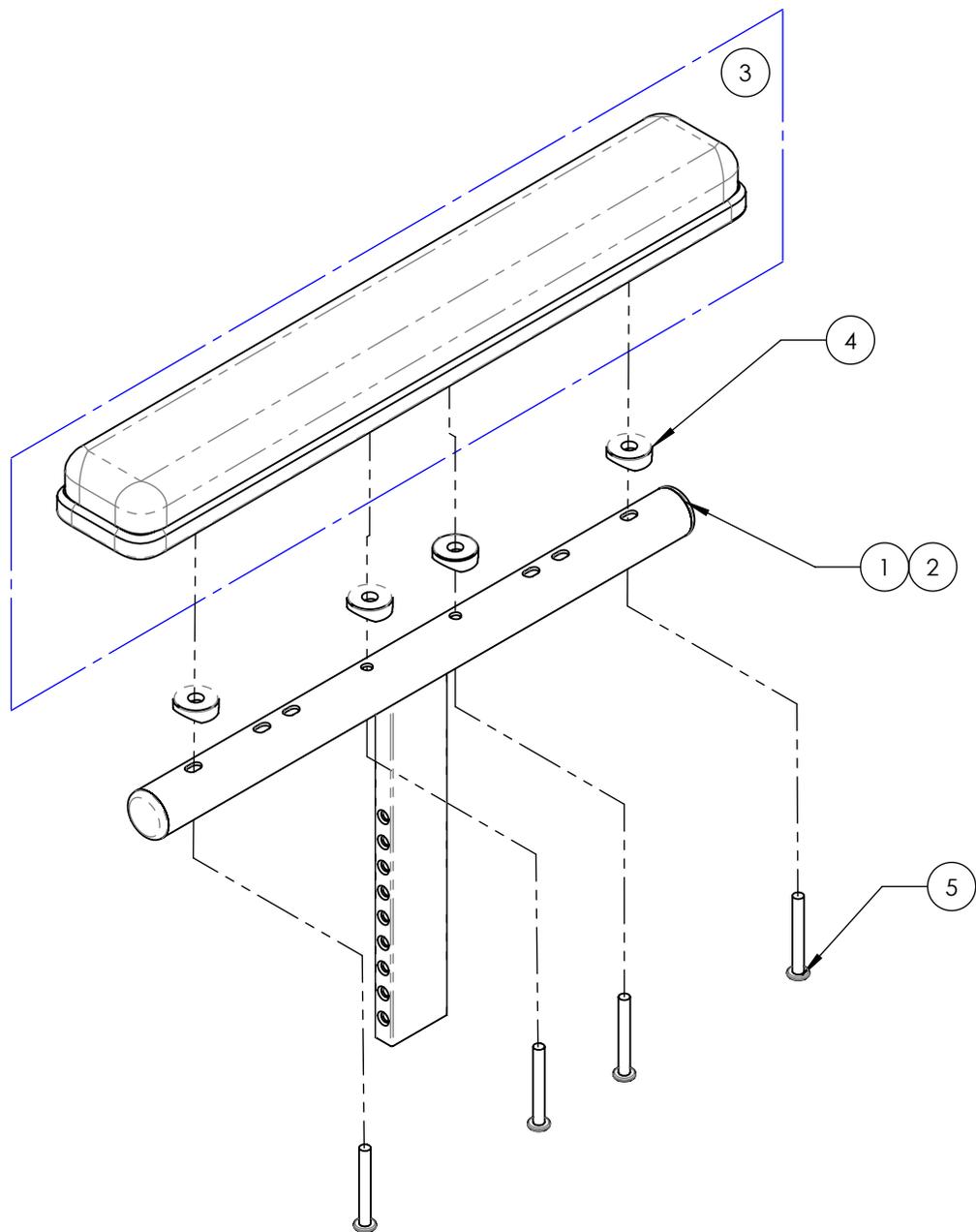


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9002933	9002934
1	0033559B-00	STRUCT APPUI BRAS V2 LONG 8-12po - ASSY	1	-
2	0033560B-00	STRUCT APPUI BRAS V2 LONG 10-14po - ASSY	-	1
3	0033077A-00	GARNITURE APPUI BRAS EN GEL OVATION 2x14po, LONG	1	1
4	0033068A-00	RONDELLE DOMÉE 1/4POX1-1/4po PLASTIQUE	4	4
5	0099013A-00	VIS TÊTE CYL LARGE PHILLIPS #10-32x1.5po L	4	4

9002933B-00
 STRUCTURE - GARNITURE GEL, 8-12po,
 LONGUE, DROITE

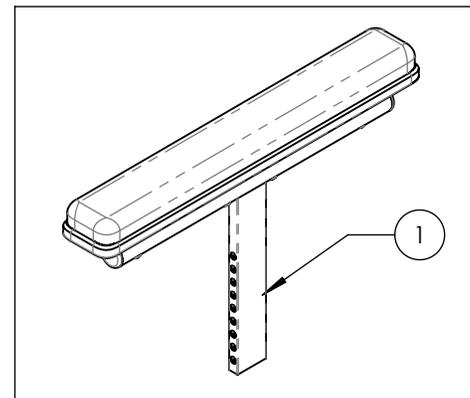


9002934B-00
 STRUCTURE - GARNITURE GEL, 10-14po,
 LONGUE, DROITE

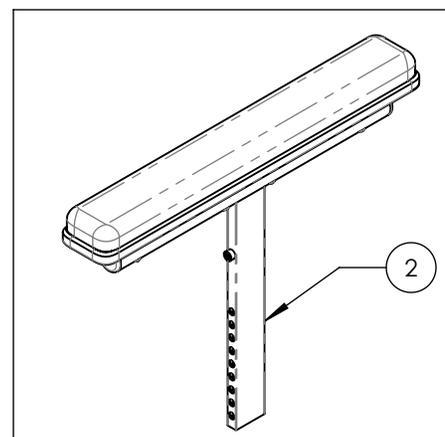


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9002935B_9002936B
APPUI-BRAS - STRUCTURE APPUI-BRAS V2, GARNITURE LONGUE EN GEL, GAUCHE

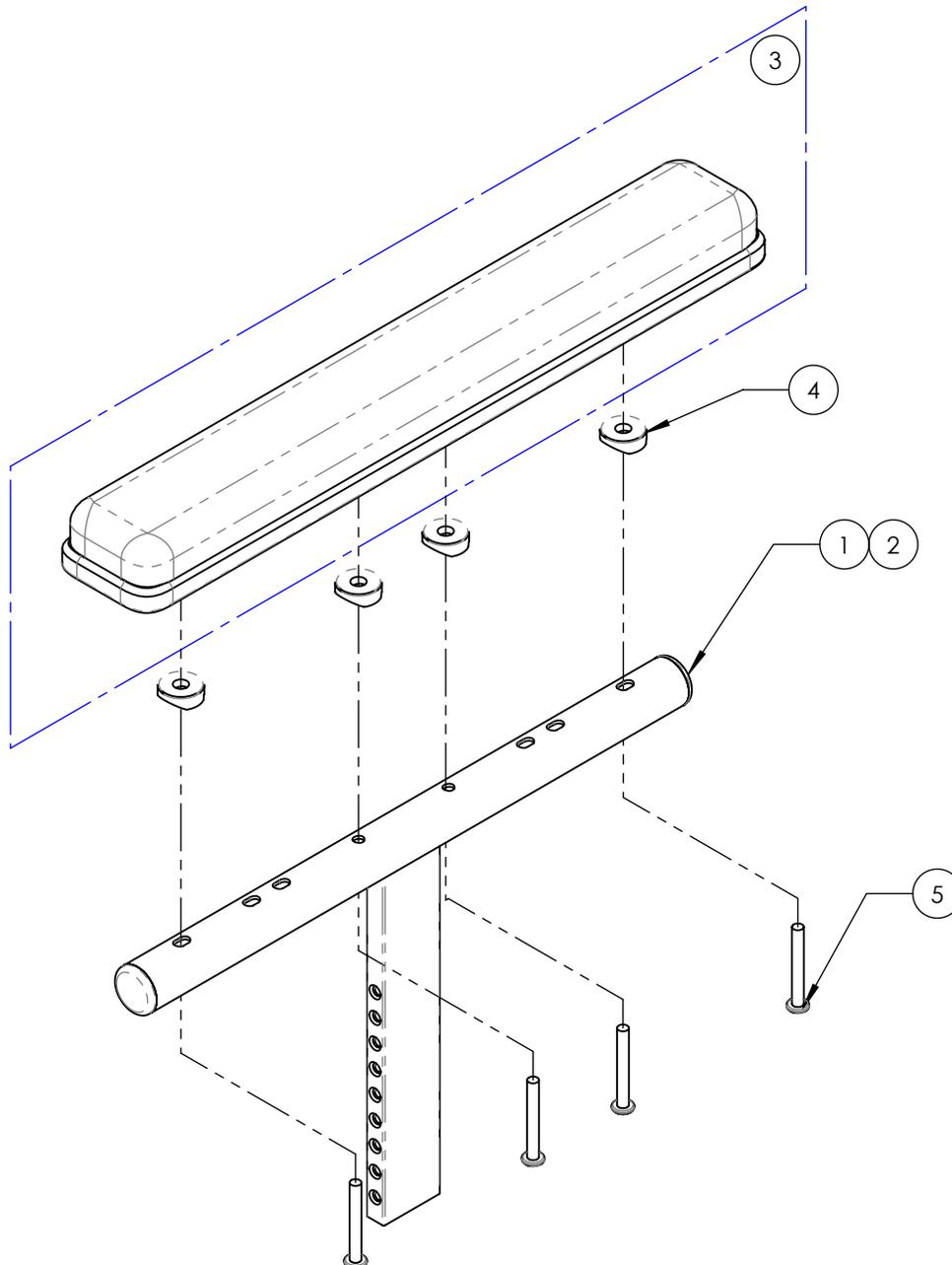


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9002935	9002936
1	0033559B-00	STRUCT APPUI BRAS V2 LONG 8-12po - ASSY	1	-
2	0033560B-00	STRUCT APPUI BRAS V2 LONG 10-14po - ASSY	-	1
3	0033077A-00	GARNITURE APPUI BRAS EN GEL OVATION 2x14po, LONG	1	1
4	0033068A-00	RONDELLE DOMÉE 1/4POX1-1/4po PLASTIQUE	4	4
5	0099013A-00	VIS TÊTE CYL LARGE PHILLIPS #10-32x1.5po L	4	4

9002935B-00
 STRUCTURE - GARNITURE GEL, 8-12po,
 LONGUE, GAUCHE

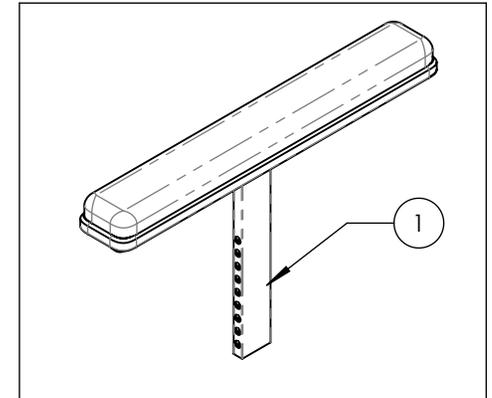



9002936B-00
 STRUCTURE - GARNITURE GEL, 10-14po,
 LONGUE, GAUCHE

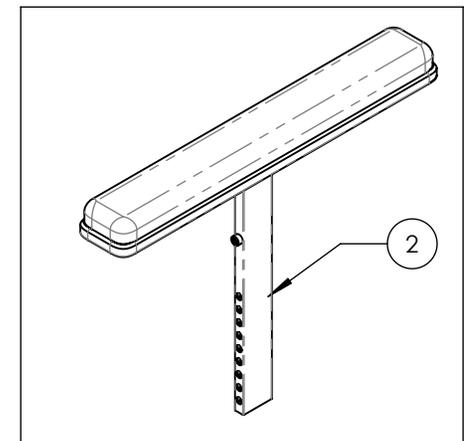


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9003551B_9003552B
APPUI-BRAS - TYPE T, DROIT, 8-12 po


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9003551	9003552
1	0033596B-00	APPUI BRAS V2T - ASSEMBLAGE	1	1
2	9010394B-00	STRUCTURE - GARNITURE STD, 8-12po, COURTE, DROITE	1	-
3	9010396B-00	STRUCTURE - GARNITURE STD, 8-12po, LONGUE, DROITE	-	1

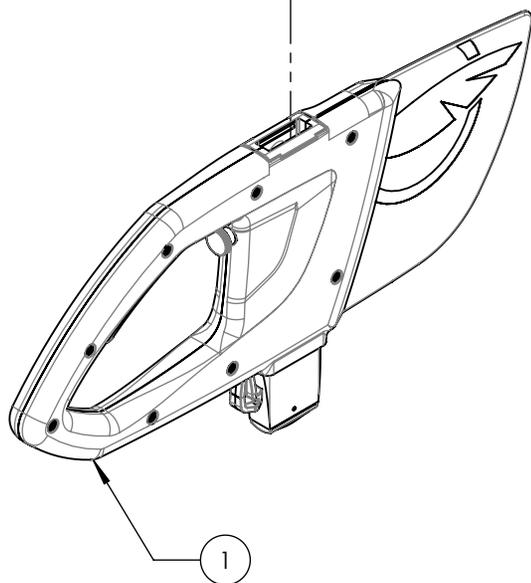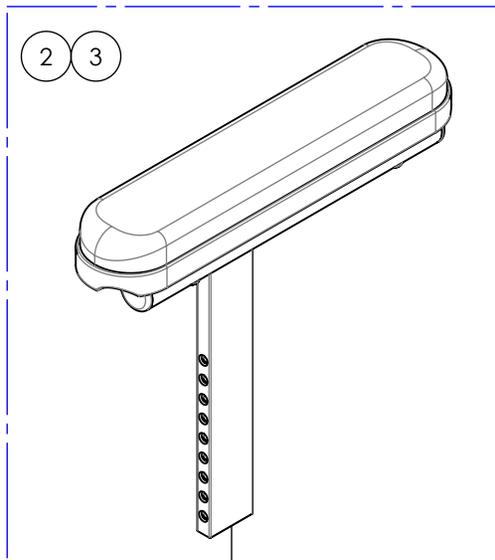

9003551B-00
 APPUI-BRAS - TYPE T, DROITE, 8-12po, COURT

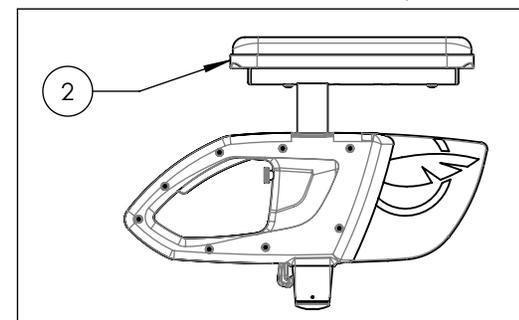



9003552B-00
 APPUI-BRAS - TYPE T, DROITE, 8-12po, LONG

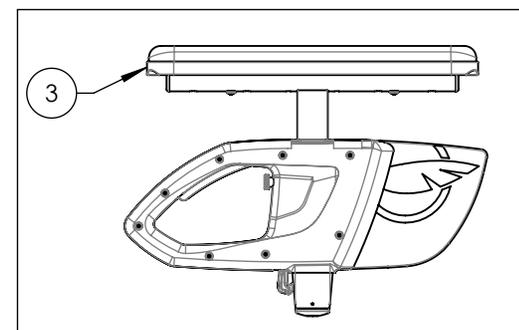


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9003553B_9003554B
APPUI-BRAS - TYPE T, DROIT, 10-14 po


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9003553	9003554
1	0033596B-00	APPUI BRAS V2T - ASSEMBLAGE	1	1
2	9010395B-00	STRUCTURE - GARNITURE STD, 10-14po, COURTE, DROITE	1	-
3	9010397B-00	STRUCTURE - GARNITURE STD, 10-14po, LONGUE, DROITE	-	1

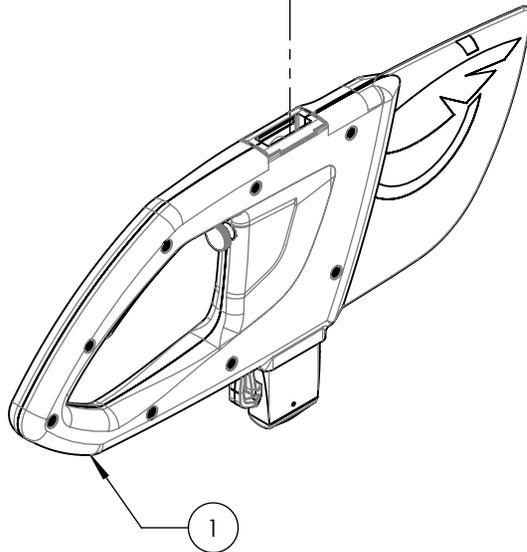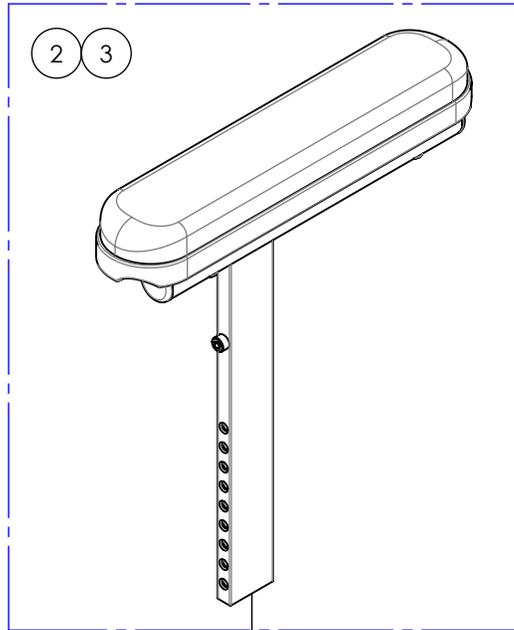

9003553B-00
 APPUI-BRAS - TYPE T, DROITE, 10-14po, COURT

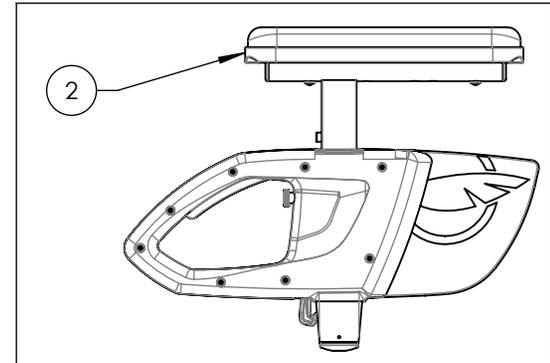



9003554B-00
 APPUI-BRAS - TYPE T, DROITE, 10-14po, LONG

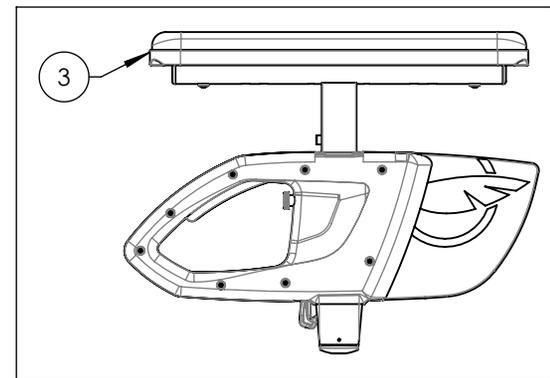


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

900355B_9003556B
APPUI-BRAS - TYPE T, GAUCHE, 8-12 po


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9003555	9003556
1	0033596B-00	APPUI BRAS V2T - ASSEMBLAGE	1	1
2	9010398B-00	STRUCTURE - GARNITURE STD, 8-12po, COURTE, GAUCHE	1	-
3	9010400B-00	STRUCTURE - GARNITURE STD, 8-12po, LONGUE, GAUCHE	-	1

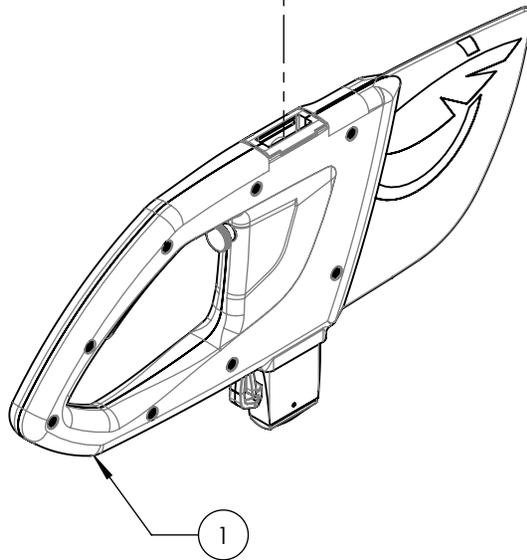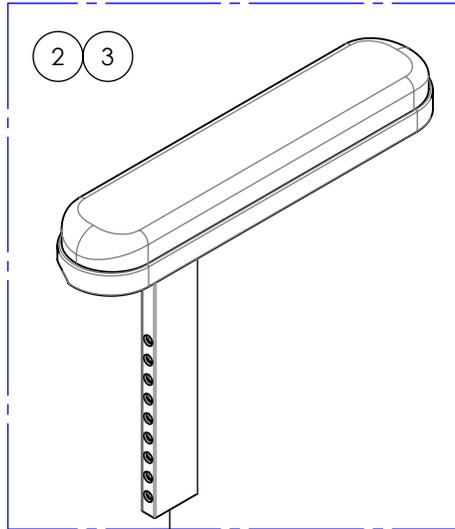

9003555B-00
 APPUI-BRAS - TYPE T, GAUCHE, 8-12po, COURT

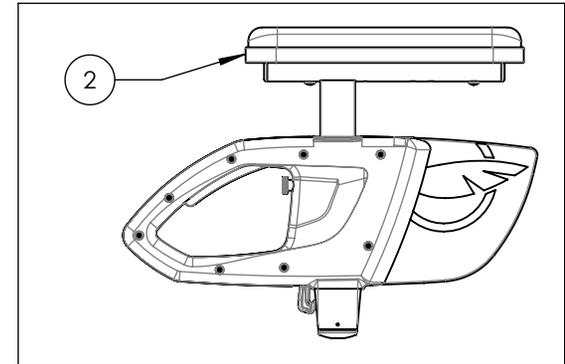



9003556B-00
 APPUI-BRAS - TYPE T, GAUCHE, 8-12po, LONG

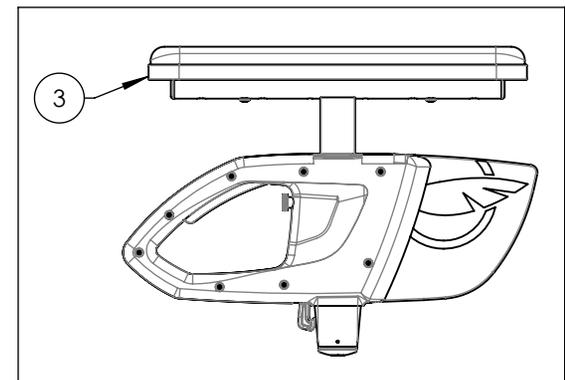


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9003557B_9003558B
APPUI-BRAS - TYPE T, GAUCHE, 10-14 po


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9003557	9003558
1	0033596B-00	APPUI BRAS V2T - ASSEMBLAGE	1	1
2	9010399B-00	STRUCTURE - GARNITURE STD, 10-14po, COURTE, GAUCHE	1	-
3	9010401B-00	STRUCTURE - GARNITURE STD, 10-14po, LONGUE, GAUCHE	-	1

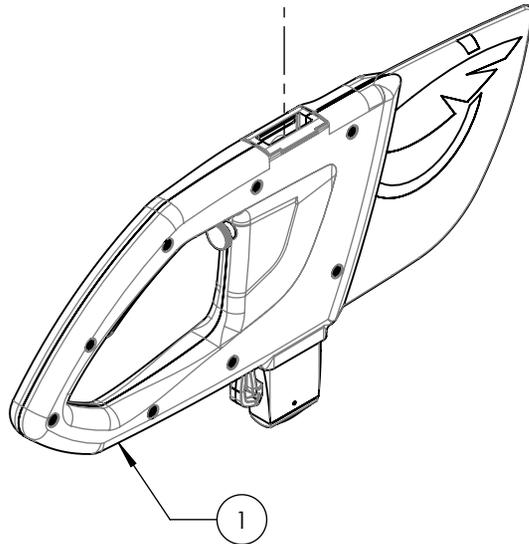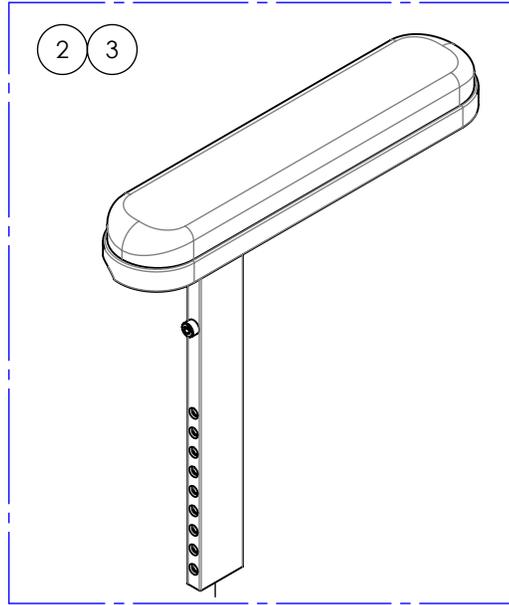

9003557B-00
 APPUI-BRAS - TYPE T, GAUCHE, 10-14po, COURT

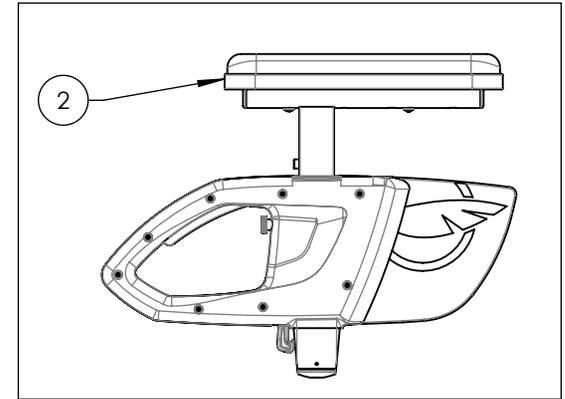



9003558B-00
 APPUI-BRAS - TYPE T, GAUCHE, 10-14po, LONG

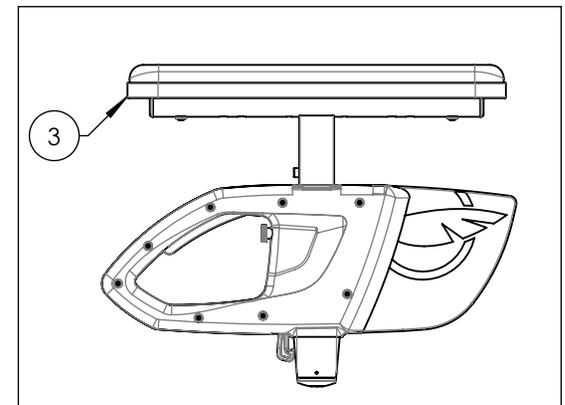

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9003652A-00
APPUI-BRAS - RF, TYPE L, DROITE, TUBULAIRE



No. ITEM	No. PIECE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0033552A-00	ÉCROU FENDU APPUI BRAS L - ASSEMBLAGE (M)	1
2	0033155A-00	APPUI BRAS EN L APEX, DROIT	1
3	0033049A-00	GANITURE TUBULAIRE APPUI BRAS L	1
4	0099702A-00	BOUCHON Ipo (ALU)	1

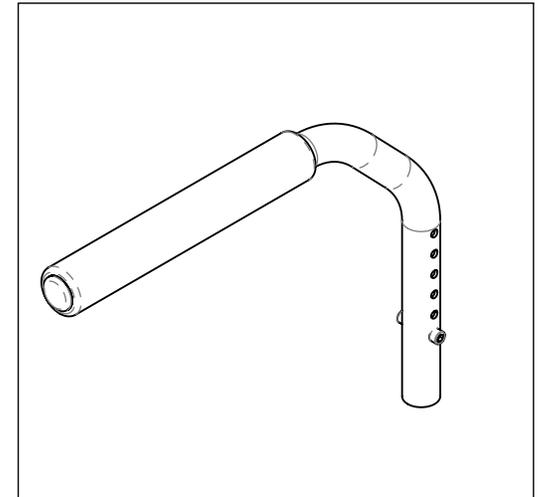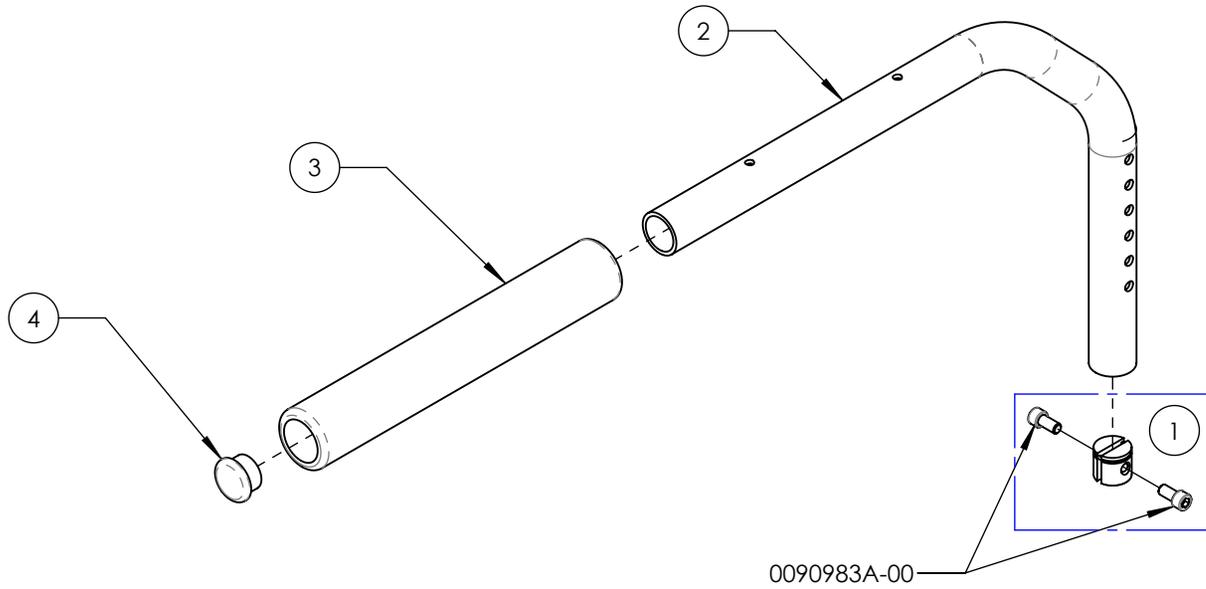

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9003653A-00
APPUI-BRAS - RF, TYPE L, GAUCHE, TUBULAIRE



No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0033552A-00	ÉCROU FENDU APPUI BRAS L - ASSEMBLAGE (M)	1
2	0033049A-00	GANITURE TUBULAIRE APPUI BRAS L	1
3	0099702A-00	BOUCHON 1po (ALU)	1
4	0033156A-00	APPUI BRAS EN L APEX, GAUCHE	1

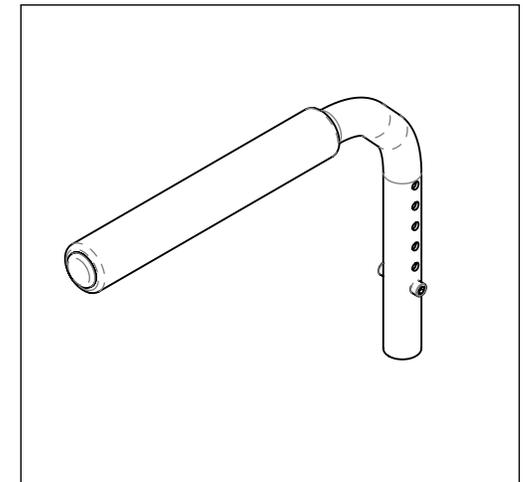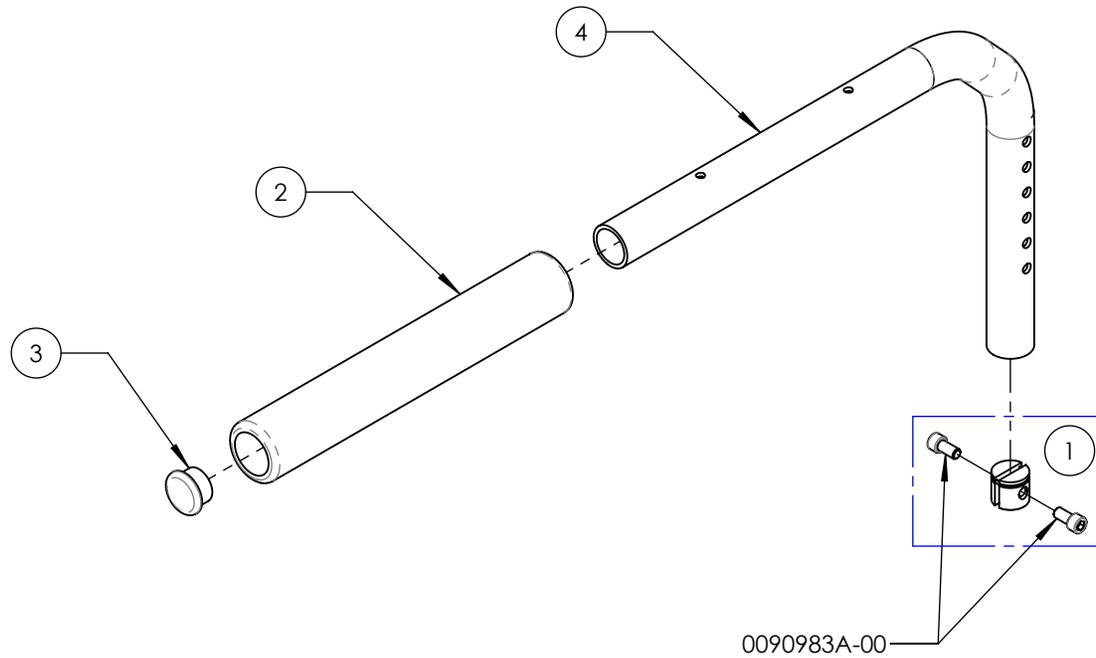

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9003654A-00
APPUI-BRAS - RF, TYPE L, DROITE, GARNITURE COURTE



No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0033552A-00	ÉCROU FENDU APPUI BRAS L - ASSEMBLAGE (M)	1
2	0033155A-00	APPUI BRAS EN L APEX, DROIT	1
3	0033038B-00	GARNITURE APPUI BRAS COURT	1
4	0099013A-00	VIS TÊTE CYL LARGE PHILLIPS #10-32x1.5po L	2
5	0099702A-00	BOUCHON 1po (ALU)	1

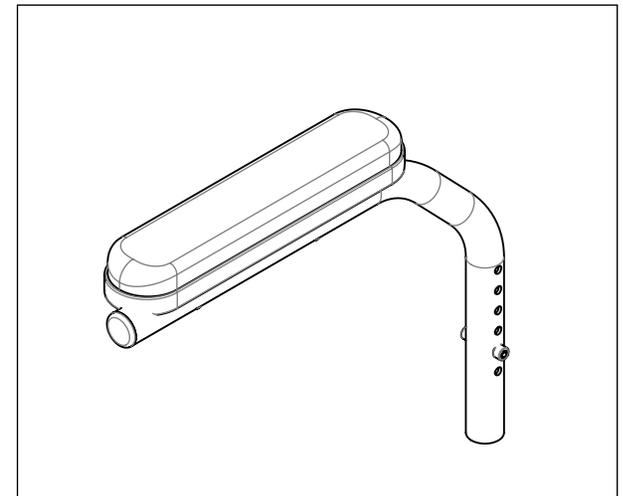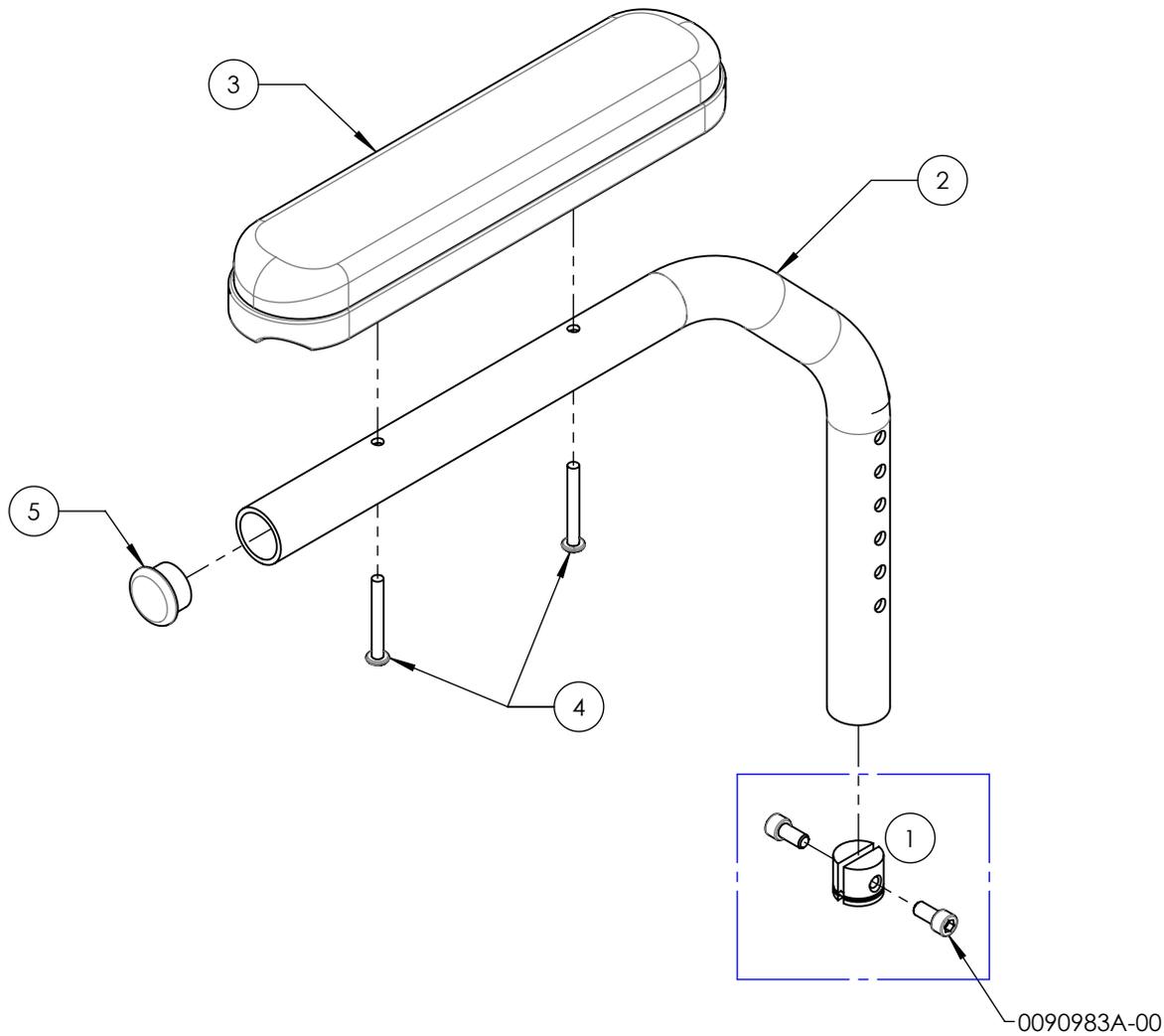

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9003655A-00
APPUI-BRAS - RF, TYPE L, GAUCHE, GARNITURE COURTE



No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0033552A-00	ÉCROU FENDU APPUI BRAS L - ASSEMBLAGE (M)	1
2	0033038B-00	GARNITURE APPUI BRAS COURT	1
3	0033156A-00	APPUI BRAS EN L APEX, GAUCHE	1
4	0099013A-00	VIS TÊTE CYL LARGE PHILLIPS #10-32x1.5po L	2
5	0099702A-00	BOUCHON 1po (ALU)	1

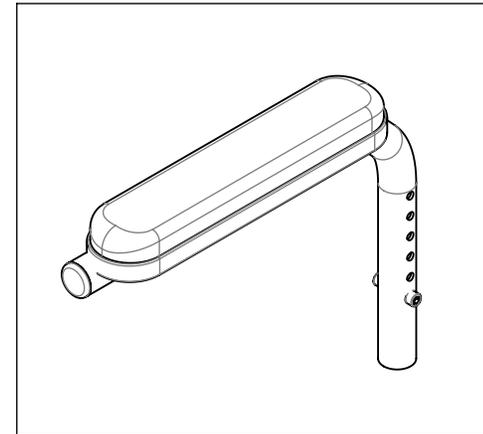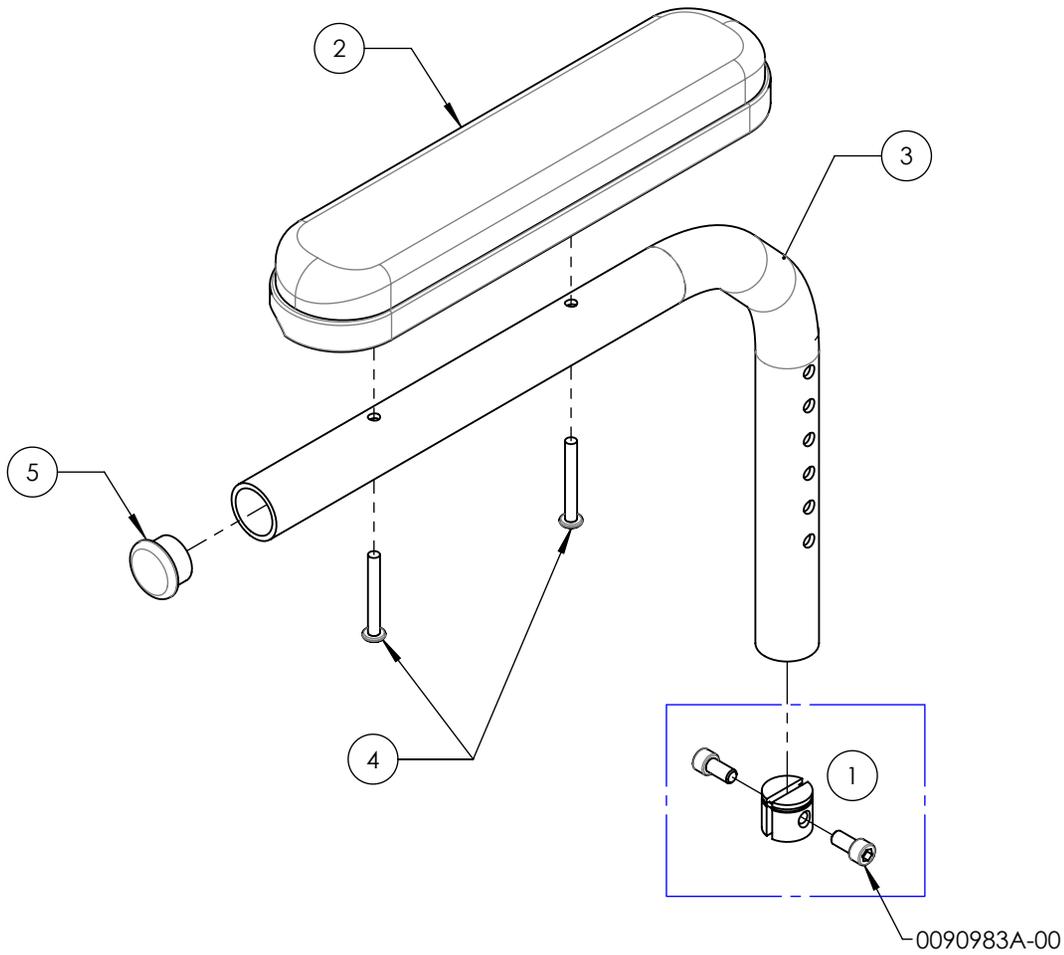

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9003656A-00
RÉCEPTACLE - RF, TYPE L, DROITE



No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0033592A-00	RÉCEPTACLE APPUI BRAS EN L, DROIT - ASSEMBLAGE	1
2	0091045A-00	VIS ÉPAULEMENT M5X0.8 X 30.5mm L	2

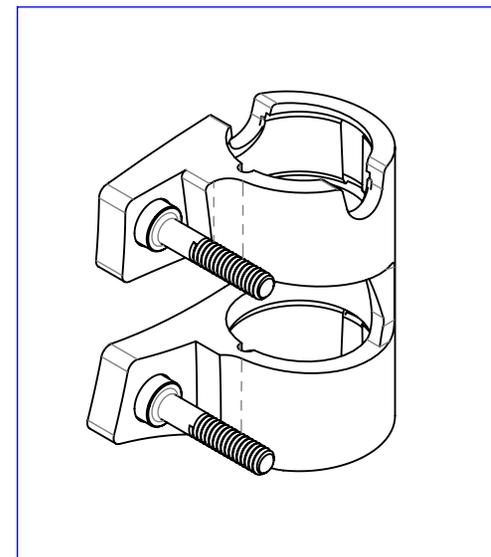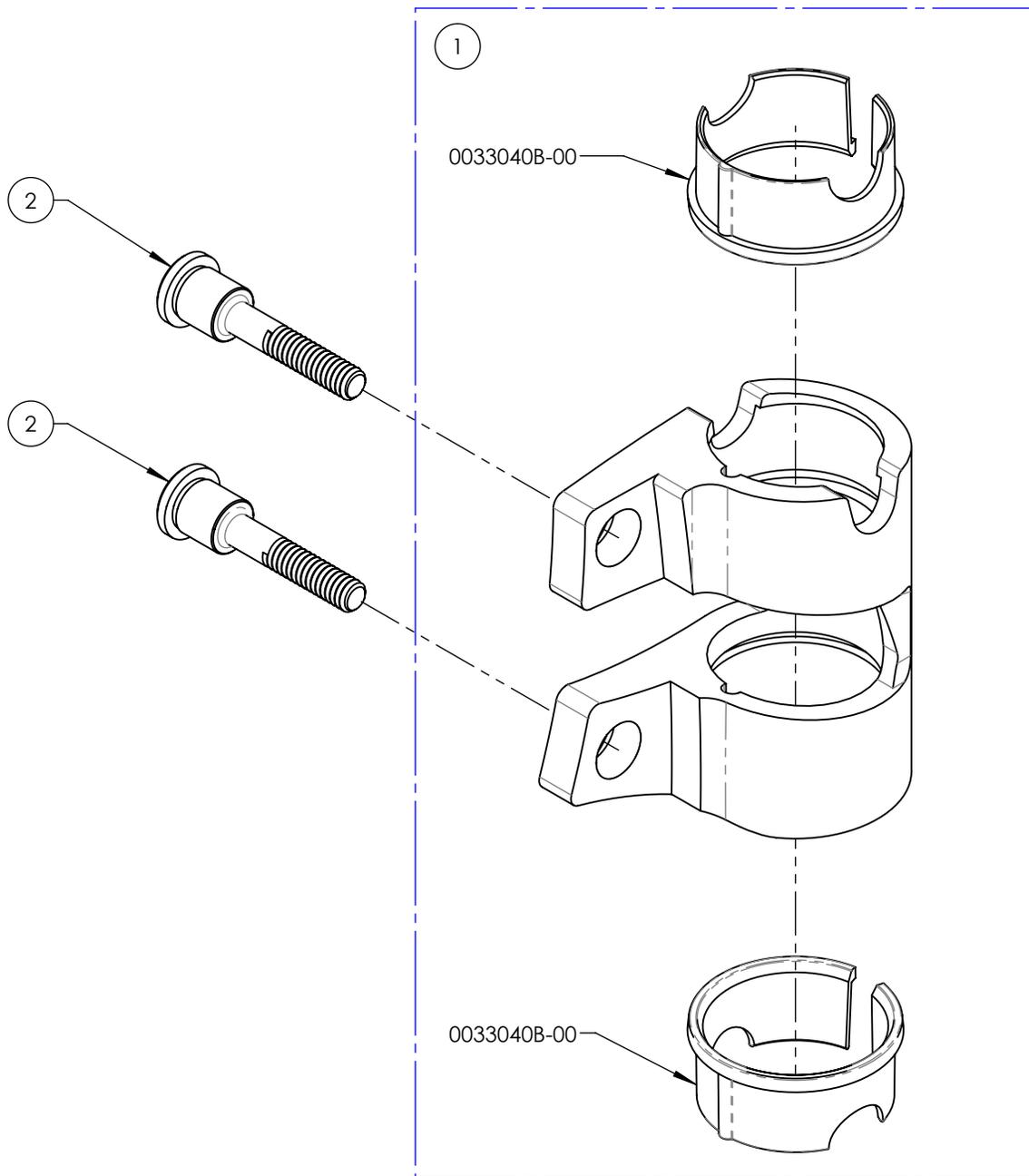

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9003657A-00
RÉCEPTACLE - RF, TYPE L, GAUCHE


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0033593A-00	RÉCEPTACLE APPUI BRAS EN L, GAUCHE - ASSEMBLAGE	1
2	0091045A-00	VIS ÉPAULEMENT M5X0.8 X 30.5mm L	2

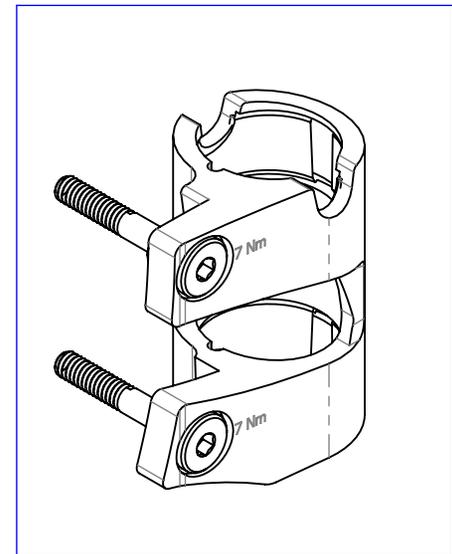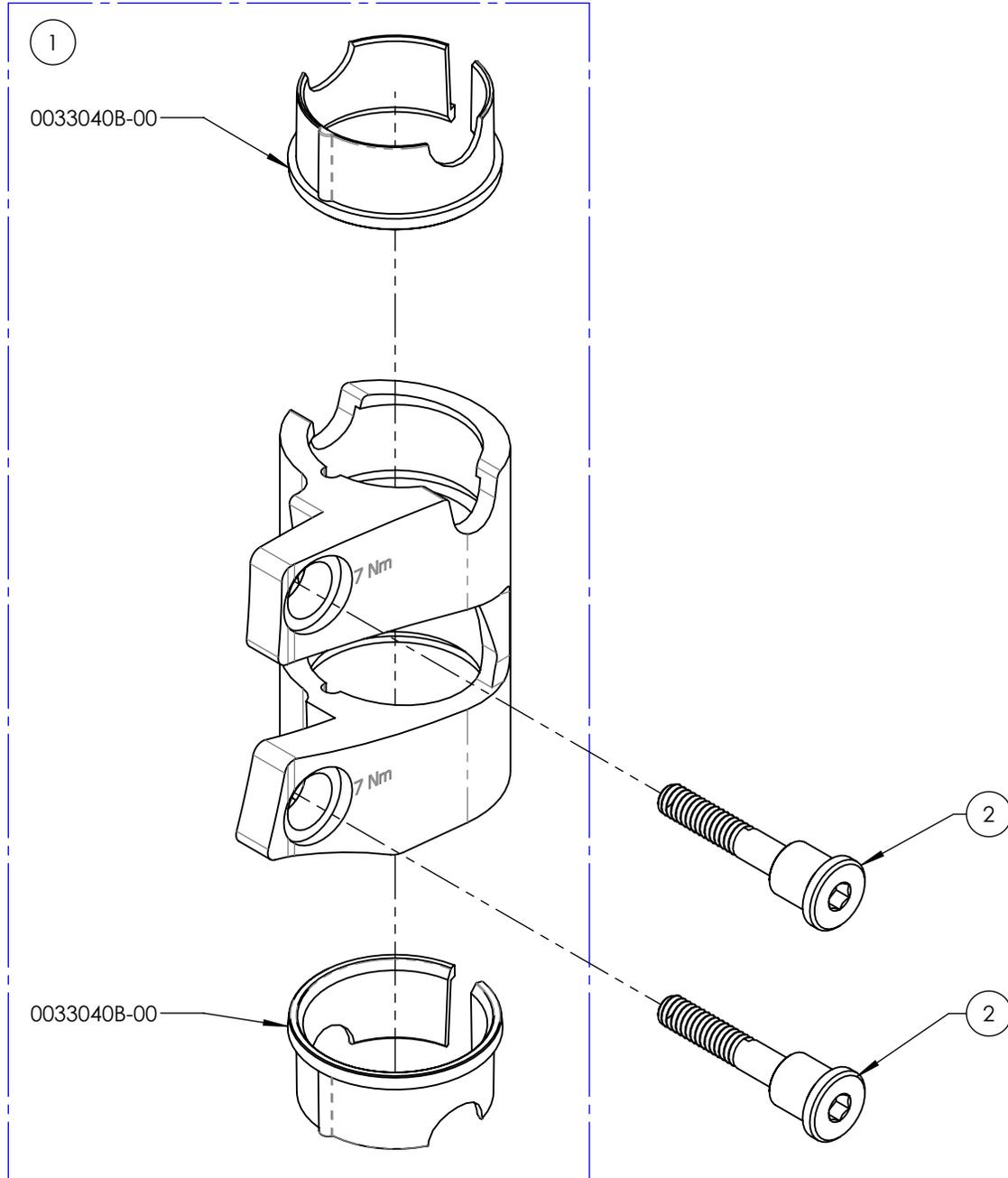


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9007814B 9007815B
STRUCTURE - WATERFALL, LONGUE, DROITE


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9007814	9007815
1	0033559B-00	STRUCT APPUI BRAS V2 LONG 8-12po - ASSY	1	-
2	0033560B-00	STRUCT APPUI BRAS V2 LONG 10-14po - ASSY	-	1
3	0033169A-00	GARNITURE APPUI BRAS INVACARE WATERFALL LONG	1	1
4	0091079A-00	VIS TÊTE CYL LARGE PHILLIPS #10-32 X 1po L	2	2

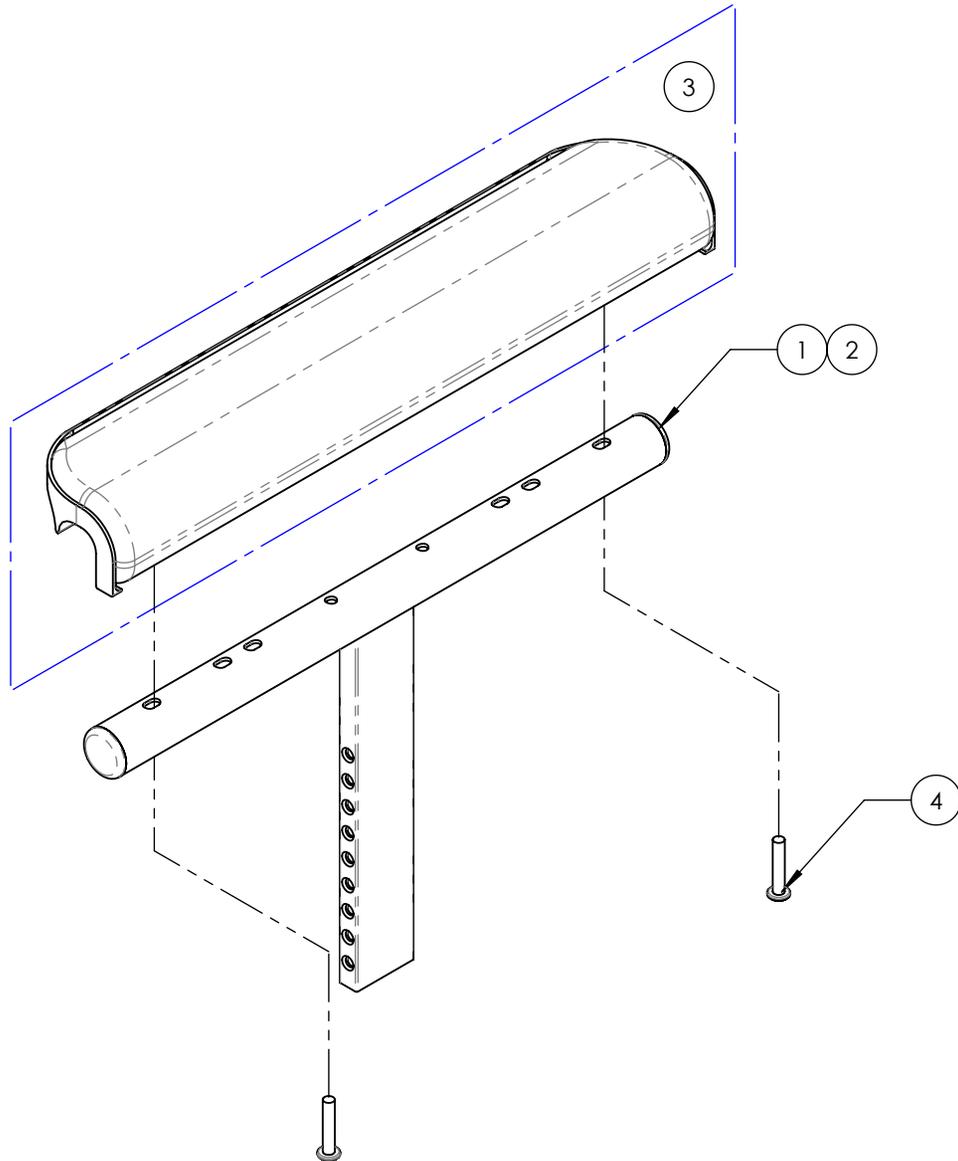

9007814B-00
 STRUCTURE - WATERFALL, 8-12po,
 LONGUE, DROITE

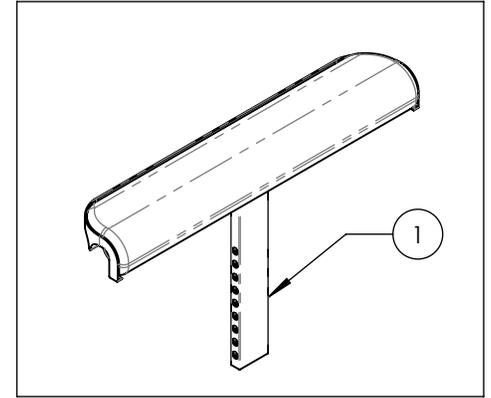


9007815B-00
 STRUCTURE - WATERFALL, 10-14po,
 LONGUE, DROITE

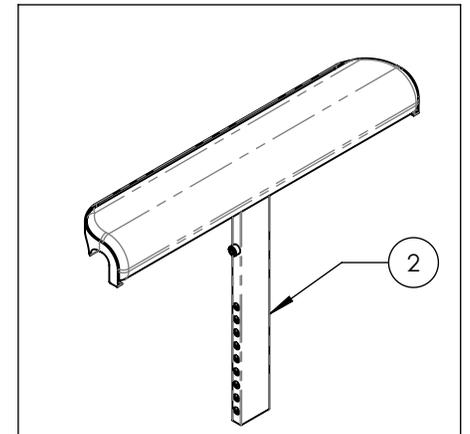


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9007816B 9007817B
STRUCTURE - WATERFALL, LONGUE, GAUCHE


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9007816	9007817
1	0033559B-00	STRUCT APPUI BRAS V2 LONG 8-12po - ASSY	1	-
2	0033560B-00	STRUCT APPUI BRAS V2 LONG 10-14po - ASSY	-	1
3	0033169A-00	GARNITURE APPUI BRAS INVACARE WATERFALL LONG	1	1
4	0091079A-00	VIS TÊTE CYL LARGE PHILLIPS #10-32 X 1po L	2	2

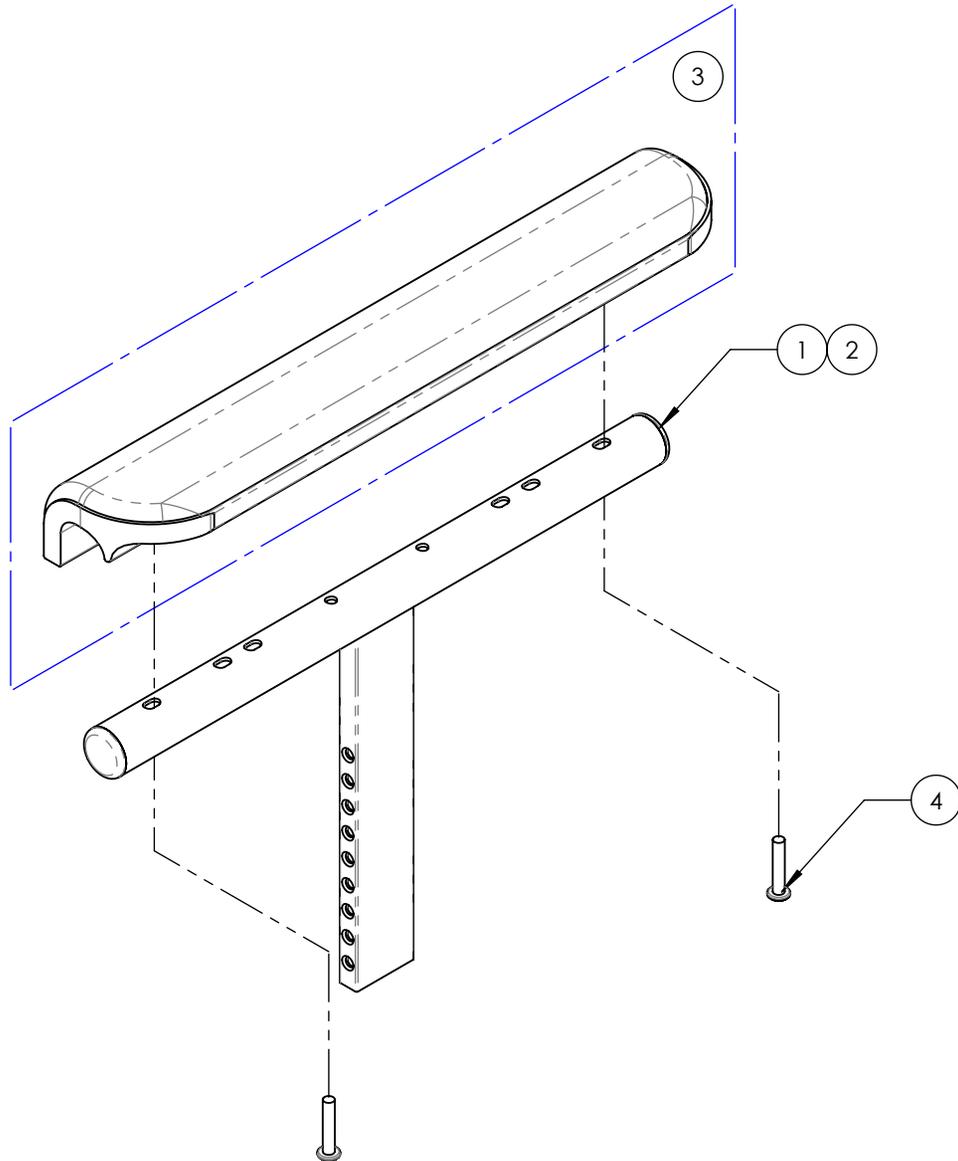

9007816B-00
 STRUCTURE - WATERFALL, 8-12po,
 LONGUE, GAUCHE

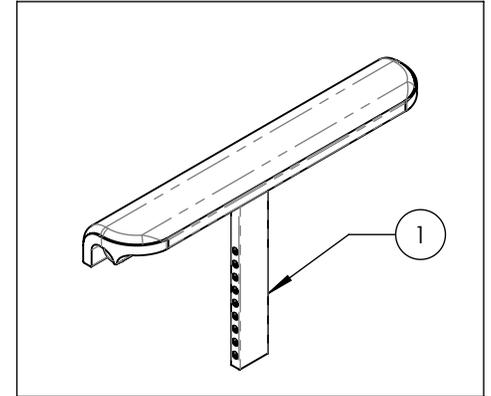


9007817B-00
 STRUCTURE - WATERFALL, 10-14po,
 LONGUE, GAUCHE

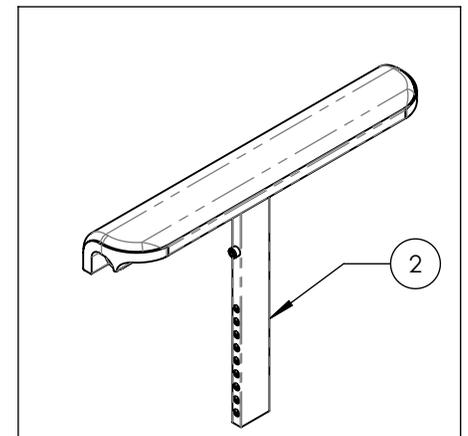

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9007818A-00
GARNITURE - WATERFALL, LONGUE


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	Default
1	0033169A-00	GARNITURE APPUI BRAS INVACARE WATERFALL LONG	1
2	0091079A-00	VIS TÊTE CYL LARGE PHILLIPS #10-32 X 1po L	2

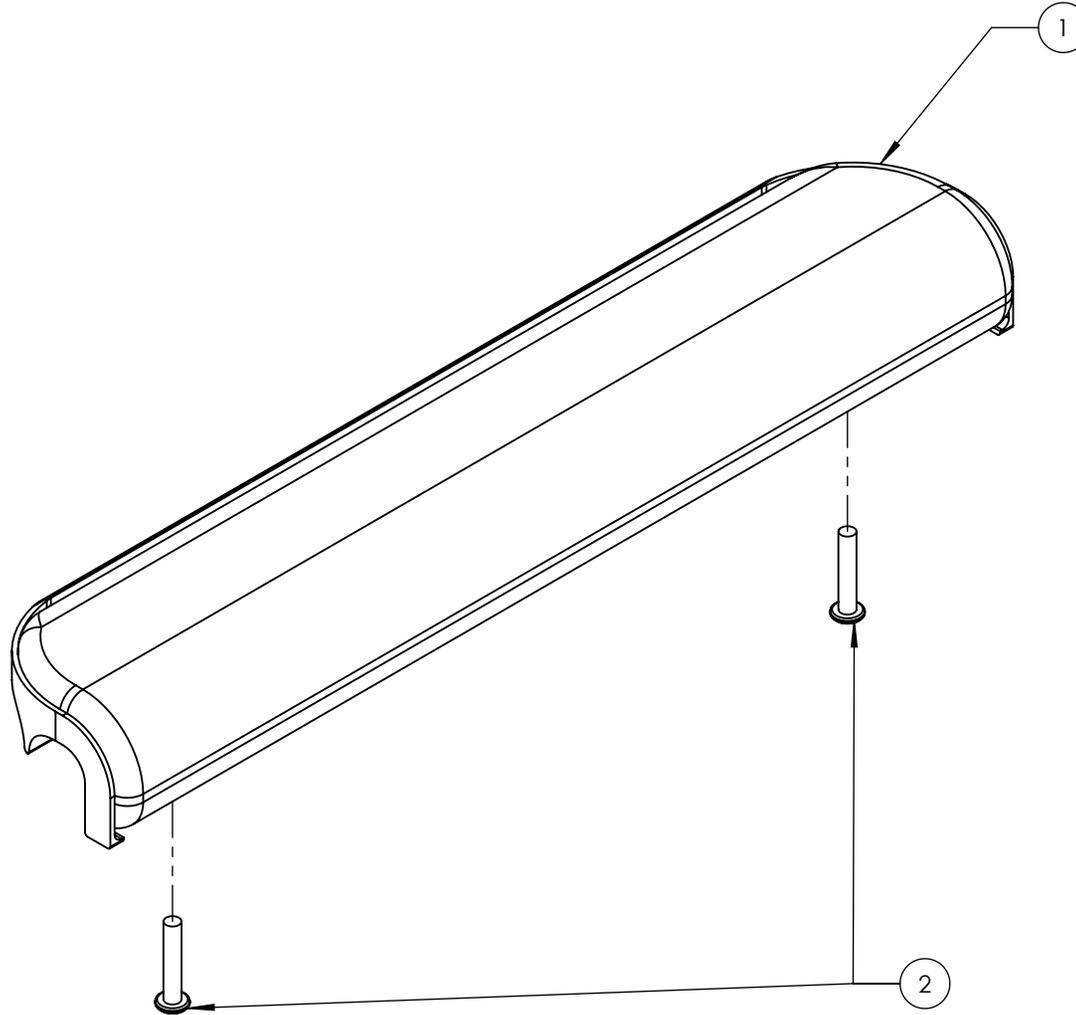


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9010394B 9010397B
STRUCTURE - GARNITURE STD, DROITE


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9010394	9010395	9010396	9010397
1	00330388-00	GARNITURE APPUI BRAS COURT	1	1	-	-
2	00330398-00	GARNITURE APPUI BRAS LONG	-	-	1	1
3	0033579B-00	STRUCT APPUI BRAS V2 COURT 8-12po - ASSY	1	-	-	-
4	0033580B-00	STRUCT APPUI BRAS V2 COURT 10-14po - ASSY	-	1	-	-
5	0033559B-00	STRUCT APPUI BRAS V2 LONG 8-12po - ASSY	-	-	1	-
6	0033560B-00	STRUCT APPUI BRAS V2 LONG 10-14po - ASSY	-	-	-	1
7	0099013A-00	VIS TÊTE CYL LARGE PHILLIPS #10-32x1.5po L	2	2	2	2

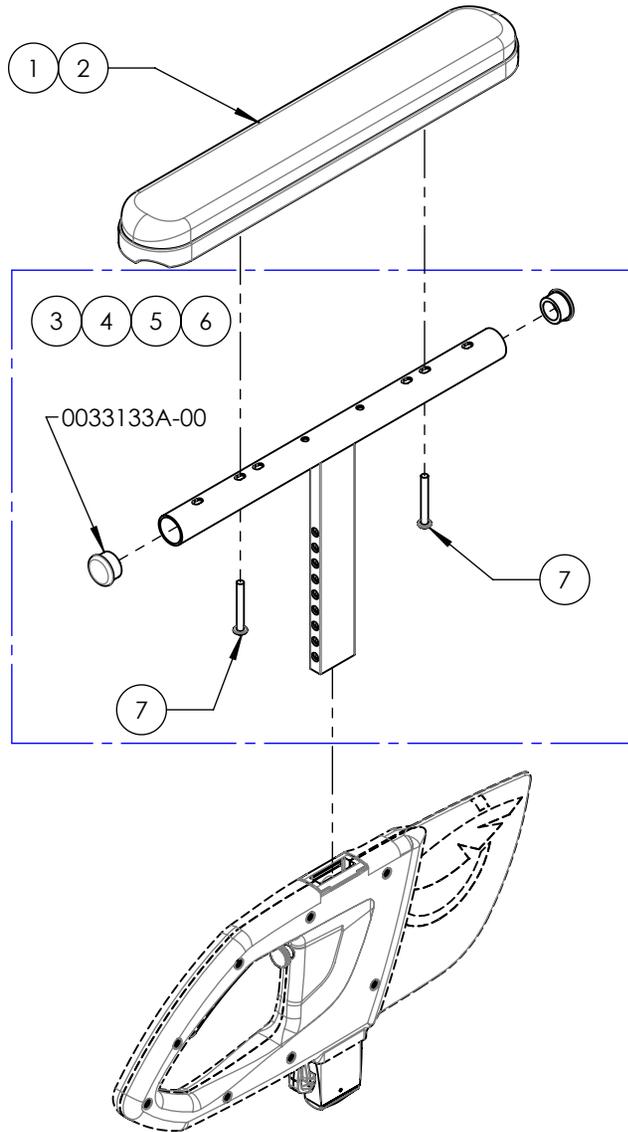


9010394B-00
 STRUCTURE - GARNITURE STD, 8-12po,
 COURTE, DROITE

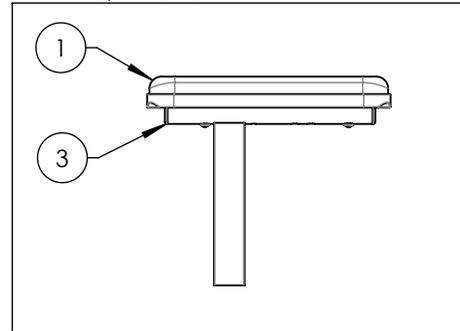


9010395B-00
 STRUCTURE - GARNITURE STD, 10-14po,
 COURTE, DROITE

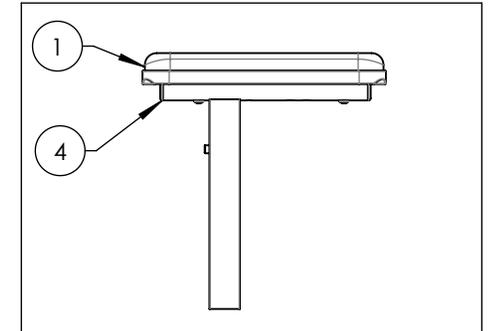

9010396B-00
 STRUCTURE - GARNITURE STD, 8-12po,
 LONGUE, DROITE

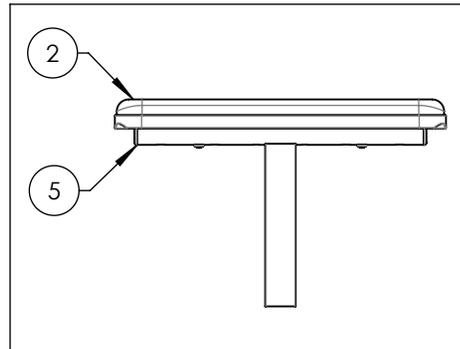


9010397B-00
 STRUCTURE - GARNITURE STD, 10-14po,
 LONGUE, DROITE

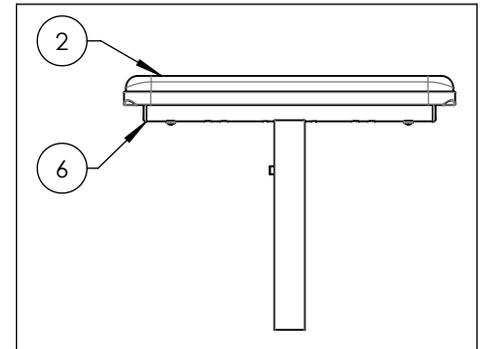


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9010398B 9010401B
STRUCTURE - GARNITURE STD, GAUCHE


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9010398	9010399	9010400	9010401
1	0033038B-00	GARNITURE APPUI BRAS COURT	1	1	-	-
2	0033039B-00	GARNITURE APPUI BRAS LONG	-	-	1	1
3	0033579B-00	STRUCT APPUI BRAS V2 COURT 8-12po - ASSY	1	-	-	-
4	0033580B-00	STRUCT APPUI BRAS V2 COURT 10-14po - ASSY	-	1	-	-
5	0033559B-00	STRUCT APPUI BRAS V2 LONG 8-12po - ASSY	-	-	1	-
6	0033560B-00	STRUCT APPUI BRAS V2 LONG 10-14po - ASSY	-	-	-	1
7	0099013A-00	VIS TÊTE CYL LARGE PHILLIPS #10-32x1.5po L	2	2	2	2

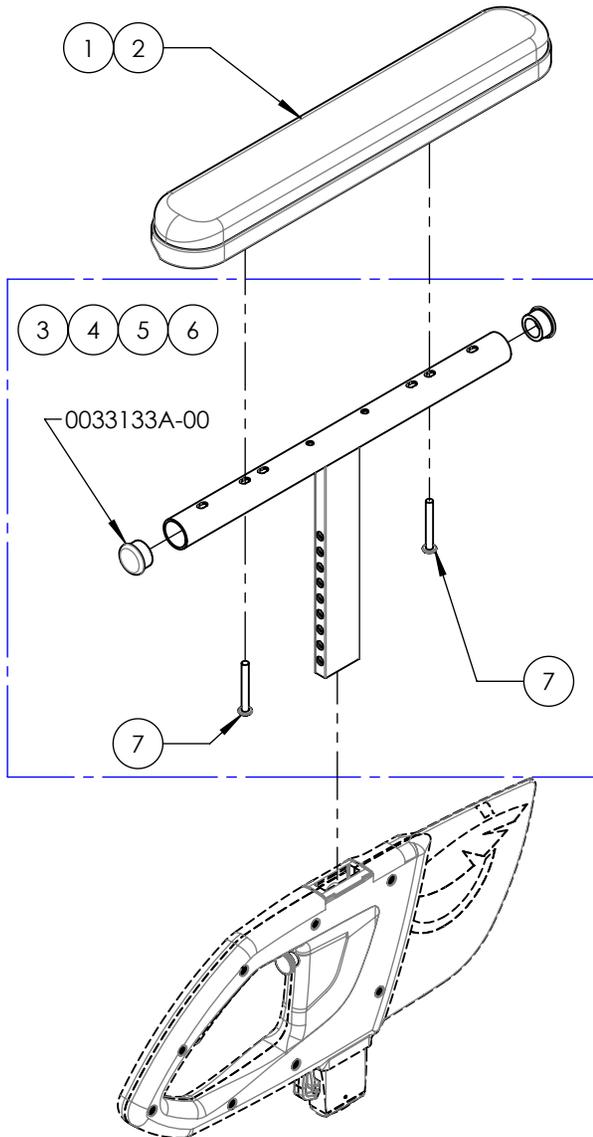


9010398B-00
 STRUCTURE - GARNITURE STD, 8-12po,
 COURTE, GAUCHE

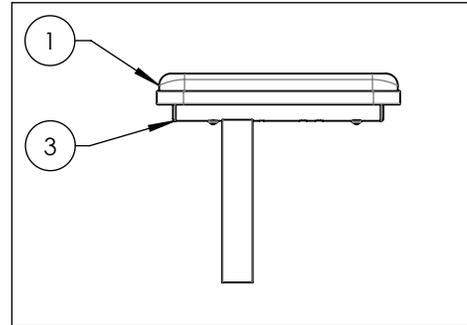


9010399B-00
 STRUCTURE - GARNITURE STD, 10-14po,
 COURTE, GAUCHE

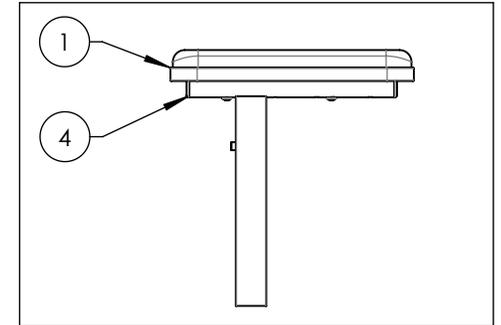

9010400B-00
 STRUCTURE - GARNITURE STD, 8-12po,
 LONGUE, GAUCHE





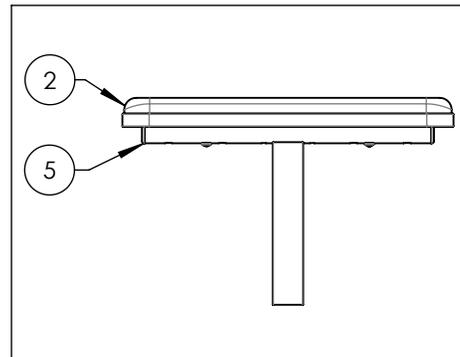


9010401B-00
 STRUCTURE - GARNITURE STD, 10-14po,
 LONGUE, GAUCHE

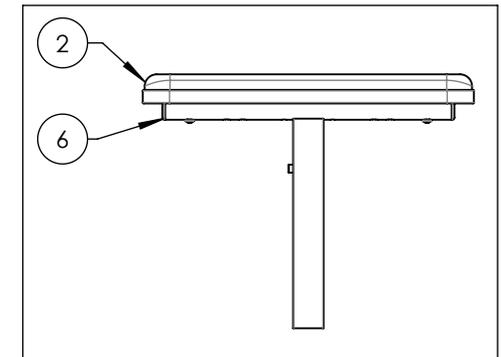


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

APPUI-BRAS STANDARD

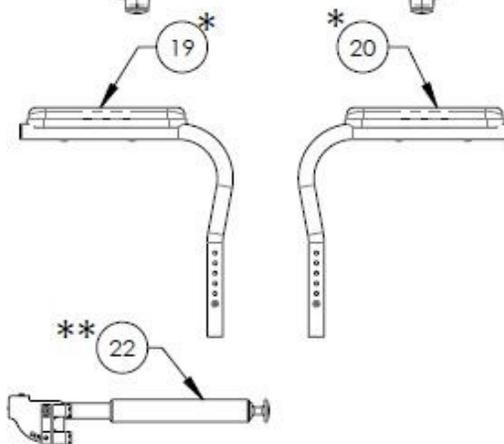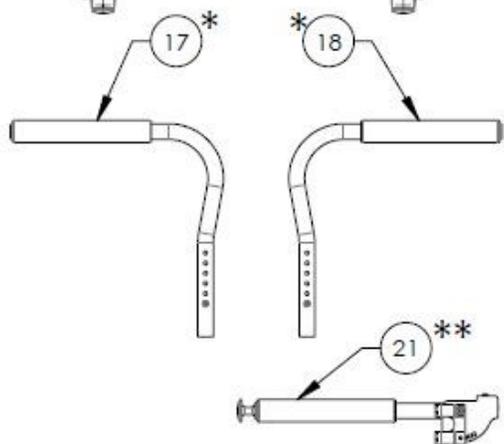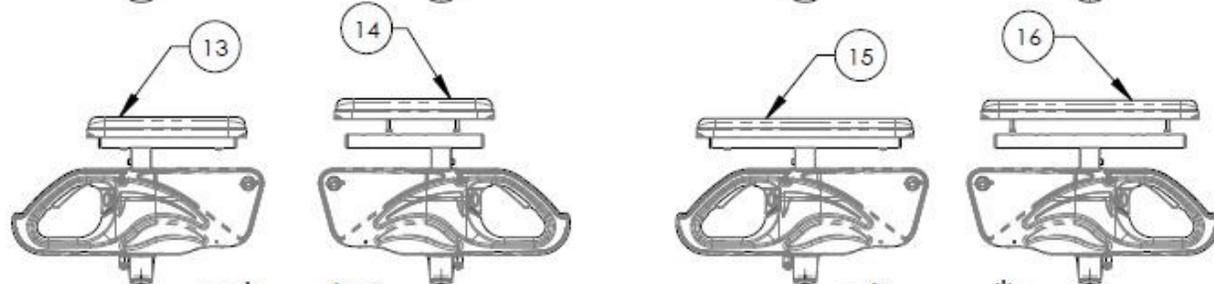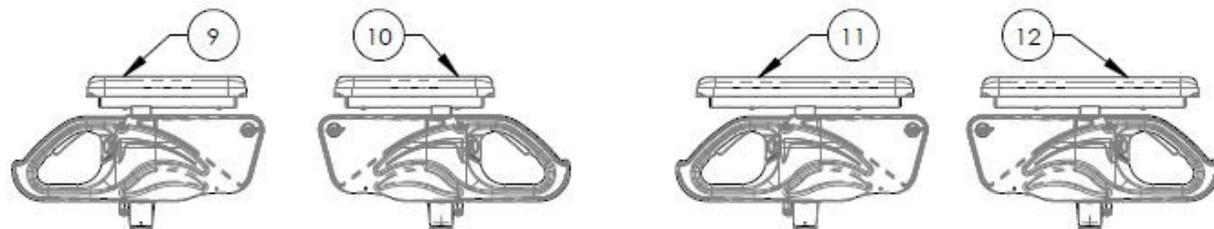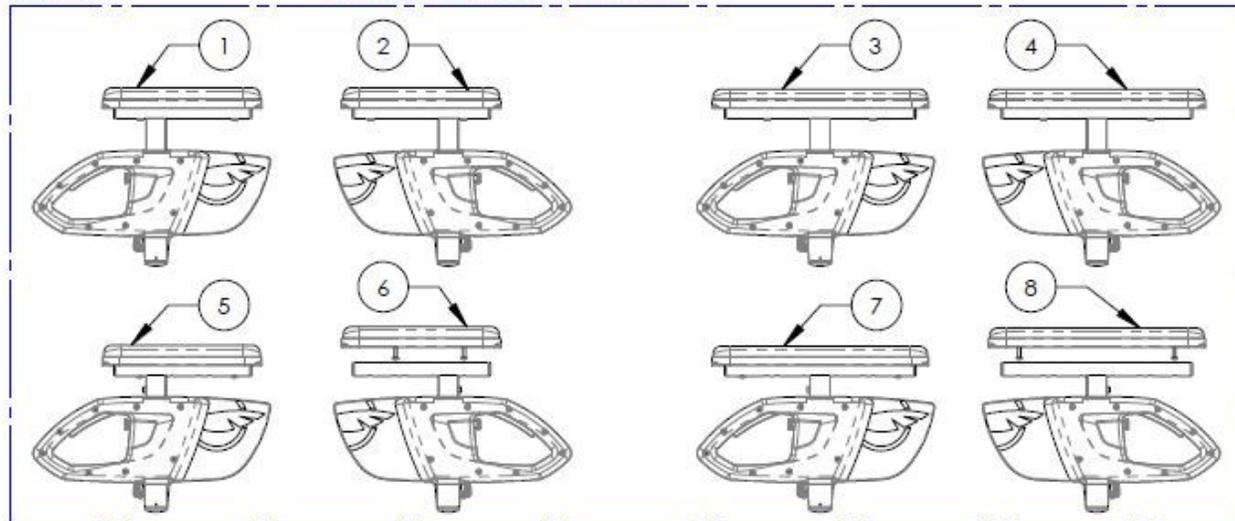

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	9003551A-00	APPUI-BRAS - TYPE T, DROITE, 8-12po, COURT	1
2	9003555A-00	APPUI-BRAS - TYPE T, GAUCHE, 8-12po, COURT	1
3	9003552A-00	APPUI-BRAS - TYPE T, DROITE, 8-12po, LONG	1
4	9003556A-00	APPUI-BRAS - TYPE T, GAUCHE, 8-12po, LONG	1
5	9003553A-00	APPUI-BRAS - TYPE T, DROITE, 10-14po, COURT	1
6	9003557A-00	APPUI-BRAS - TYPE T, GAUCHE, 10-14po, COURT	1
7	9003554A-00	APPUI-BRAS - TYPE T, DROITE, 10-14po, LONG	1
8	9003558A-00	APPUI-BRAS - TYPE T, GAUCHE, 10-14po, LONG	1
9	9001299A-00	APPUI-BRAS - TYPE T & U, DROITE, 8-12po, COURT	1
10	9001303A-00	APPUI-BRAS - TYPE T & U, GAUCHE, 8-12po, COURT	1
11	9001300A-00	APPUI-BRAS - TYPE T & U, DROITE, 8-12po, LONG	1
12	9001304A-00	APPUI-BRAS - TYPE T & U, GAUCHE, 8-12po, LONG	1
13	9001301A-00	APPUI-BRAS - TYPE T & U, DROITE, 10-14po, COURT	1
14	9001305A-00	APPUI-BRAS - TYPE T & U, GAUCHE, 10-14po, COURT	1
15	9001302A-00	APPUI-BRAS - TYPE T & U, DROITE, 10-14po, LONG	1
16	9001306A-00	APPUI-BRAS - TYPE T & U, GAUCHE, 10-14po, LONG	1
17*	9001308A-00	APPUI-BRAS - TYPE L, DROITE, TUBULAIRE	1
18*	9001309A-00	APPUI-BRAS - TYPE L, GAUCHE, TUBULAIRE	1
19*	9001310A-00	APPUI-BRAS - TYPE L, DROITE, GARNITURE COURTE	1
20*	9001311A-00	APPUI-BRAS - TYPE L, GAUCHE, GARNITURE COURTE	1
21**	0033503A-00	APPUI BRAS EN I, DROITE - ASSY	1
22**	0033504A-00	APPUI BRAS EN I, GAUCHE - ASSY	1
23	0007400A-00	APPUI-BRAS - TYPE T, DROITE, 6-10 po, COURT	1
24	0007402A-00	APPUI-BRAS - TYPE T, GAUCHE, 6-10 po, COURT	1
25	0007400A-01	APPUI-BRAS - TYPE T, DROITE, 6-10 po, LONG	1
26	0007402A-01	APPUI-BRAS - TYPE T, GAUCHE, 6-10 po, LONG	1




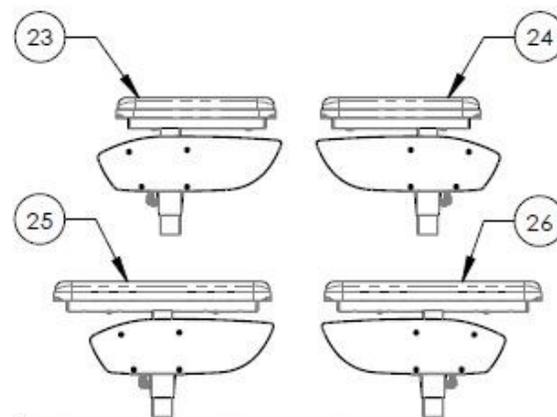


*: NON DISPONIBLE AVEC LES DOSSIERS AJUSTABLE EN PROFONDEUR
 **: À UTILISER SEULEMENT AVEC MONTANTS DE DOSSIER EN ALUMINIUM (175lbs MAX)

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

Catalogue d'appui-bras
Appui-bras - Garniture en gel



No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	9002932A-00	GARNITURE - GEL, LONGUE	1
2	9002933B-00	STRUCTURE - GARNITURE GEL, 8-12po, LONGUE, DROITE	1
3	9002934B-00	STRUCTURE - GARNITURE GEL, 10-14po, LONGUE, DROITE	1
4	9002935B-00	STRUCTURE - GARNITURE GEL, 8-12po, LONGUE, GAUCHE	1
5	9002936B-00	STRUCTURE - GARNITURE GEL, 10-14po, LONGUE, GAUCHE	1

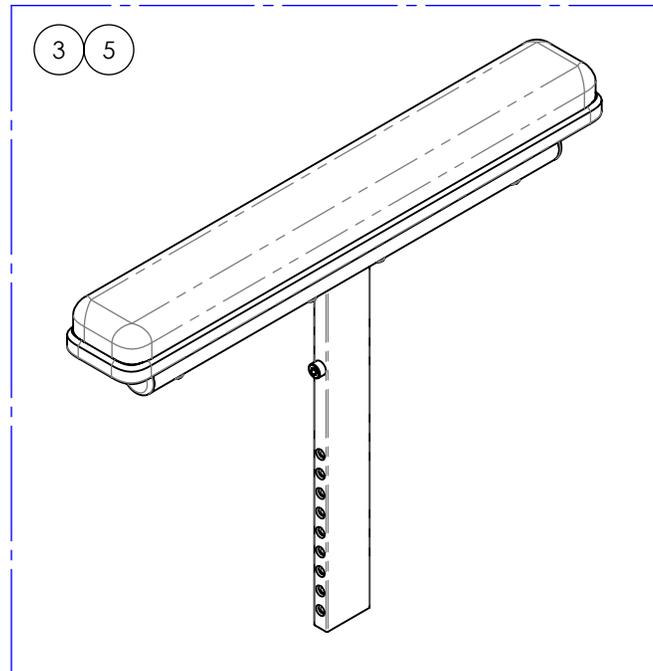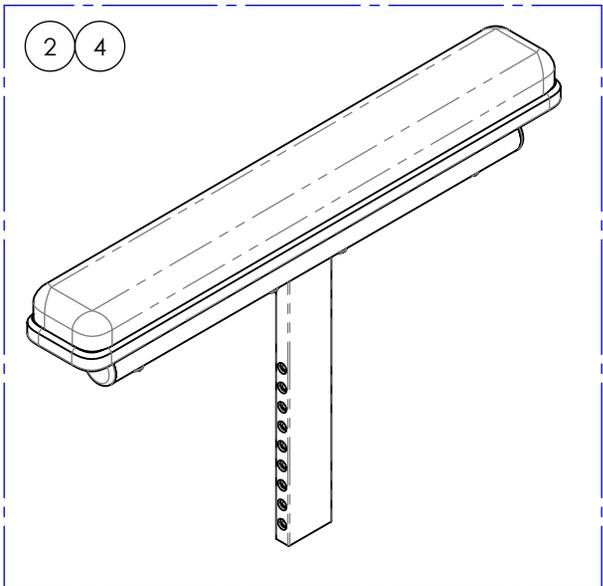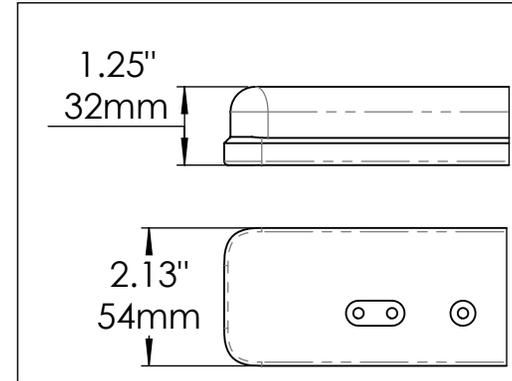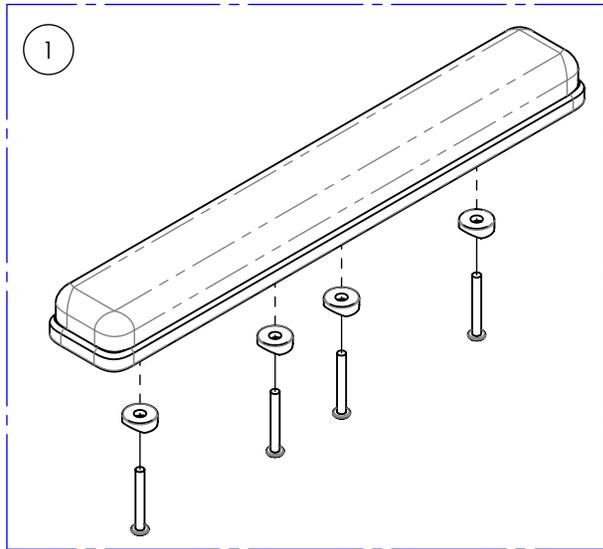

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

Catalogue d'appui-bras
Appui-bras - Receptacle type T


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0004111A-00	RECEPTACLE APPUI BRAS V3	2

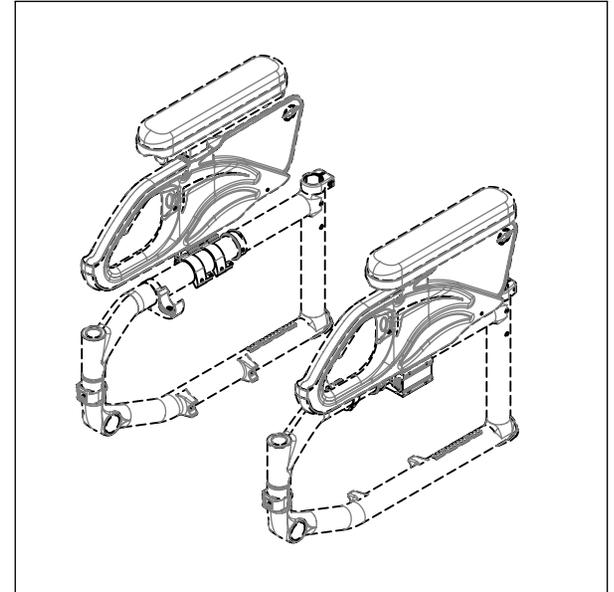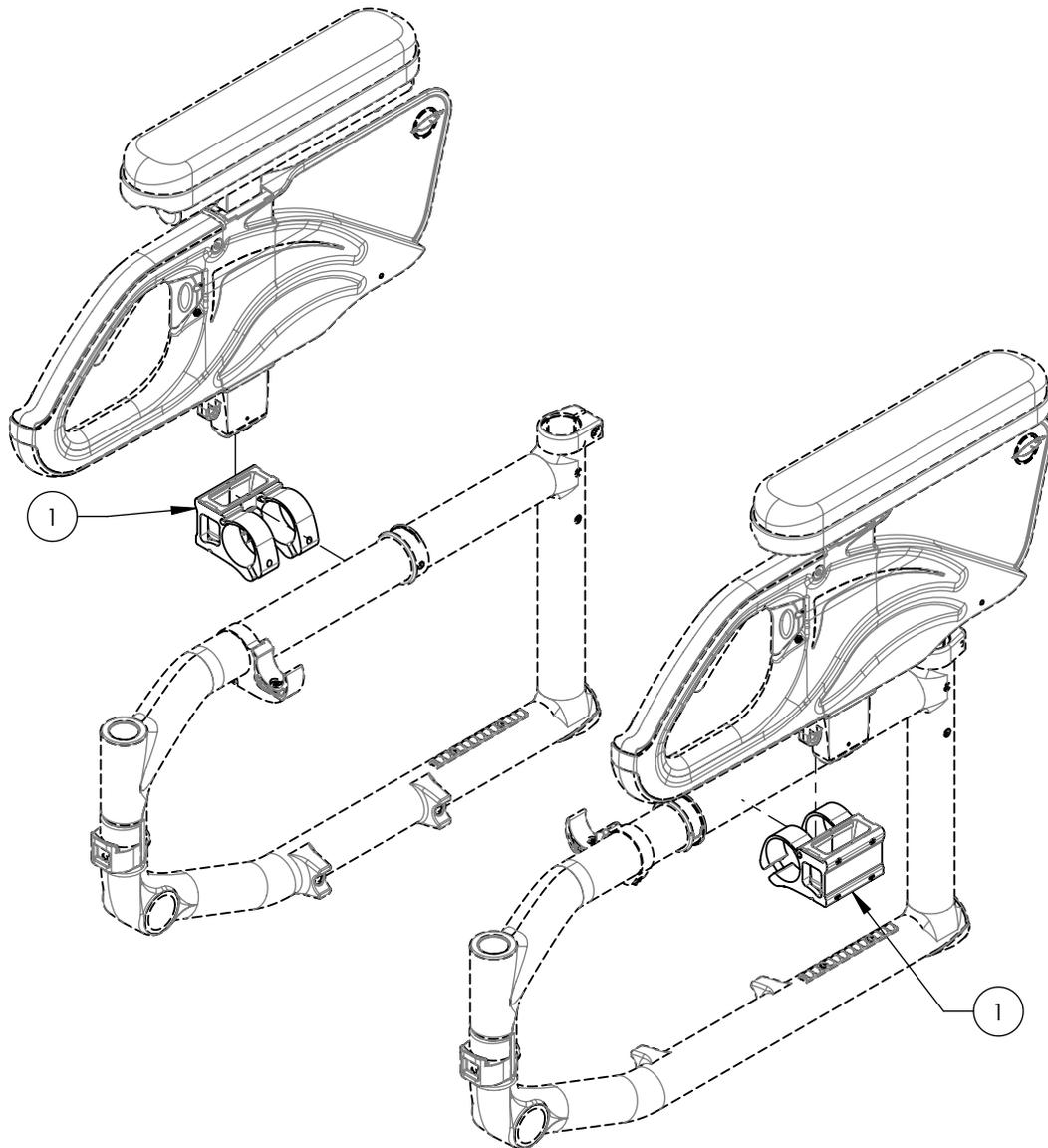


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

Catalogue d'appui-bras
Réceptacle appui-bras en L

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	9003656A-00	RÉCEPTACLE - RF, TYPE L, DROITE	1
2	9003657A-00	RÉCEPTACLE - RF, TYPE L, GAUCHE	1

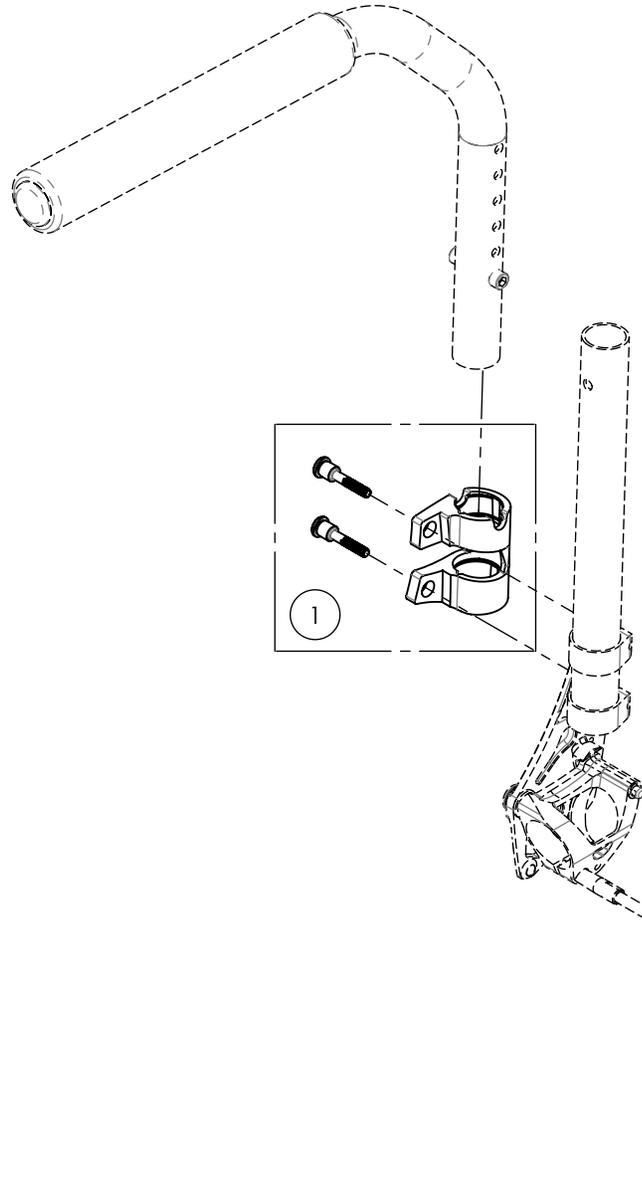




DISPONIBLE SEULEMENT POUR DOSSIER RABATTABLE AVEC VÉROUILLAGE

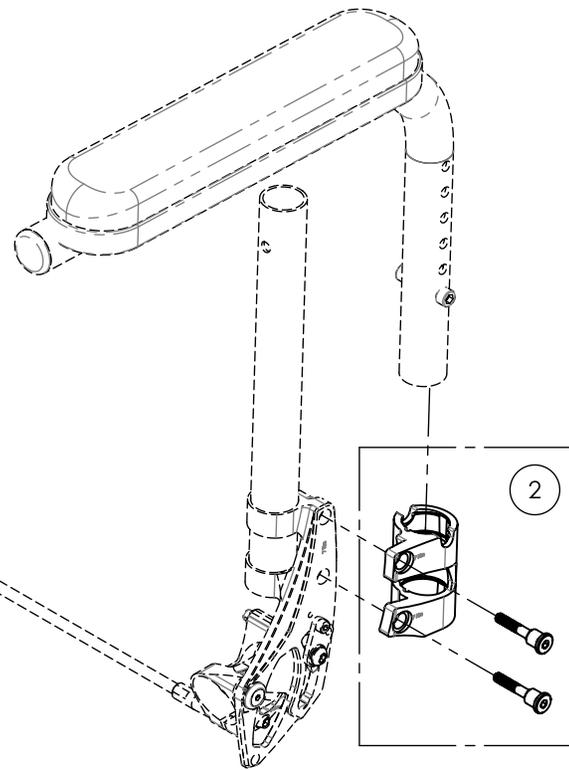

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

CATALOGUE D'APPUI-BRAS
APPUI-BRAS - GARNITURE WATERFALL


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	9007818A-00	GARNITURE - WATERFALL, LONGUE	1
2	9007814B-00	STRUCTURE - WATERFALL, 8-12po, LONGUE, DROITE	1
3	9007816B-00	STRUCTURE - WATERFALL, 8-12po, LONGUE, GAUCHE	1
4	9007815B-00	STRUCTURE - WATERFALL, 10-14po, LONGUE, DROITE	1
5	9007817B-00	STRUCTURE - WATERFALL, 10-14po, LONGUE, GAUCHE	1

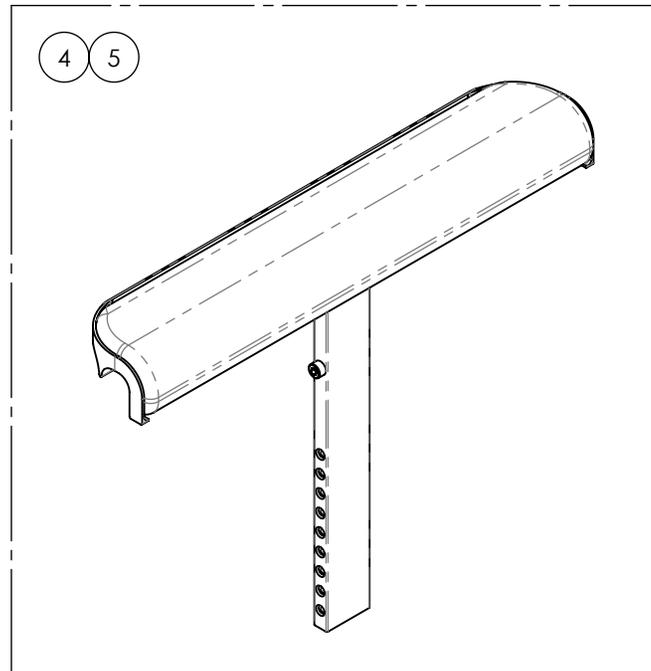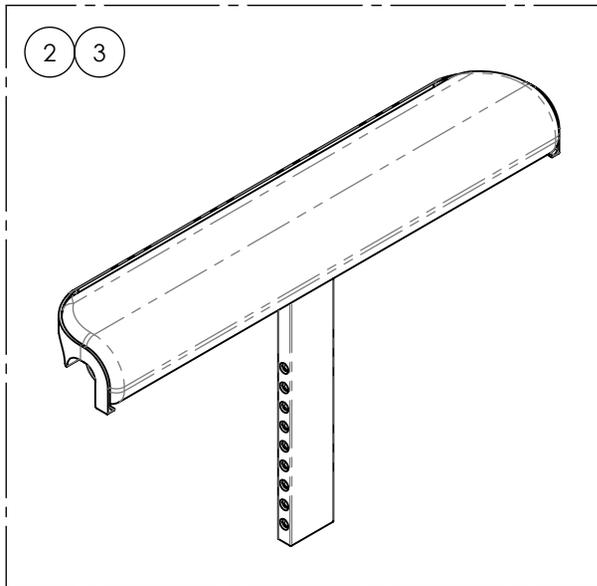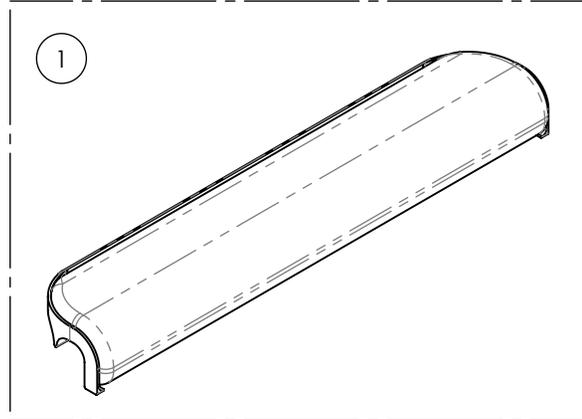


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9001295A_9001296A
PROTÈGE-VÊTEMENTS - PLASTIQUE, AMOVIBLE, DROIT


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9001295	9001296
1	0051002A-00	PROTÈGE-VÊTEMENT PLASTIQUE PETIT - ASSY	1	-
2	0051003A-00	PROTÈGE-VÊTEMENT PLASTIQUE MOYEN - ASSY	-	1
3	0051118A-00	PLAQUE AJUSTEMENT GARDE BOUE & PROTÈGE VÊTEMENT	1	1
4	0090631A-00	VIS TÊTE BOMBÉE M4x0.7x8mm L	4	4

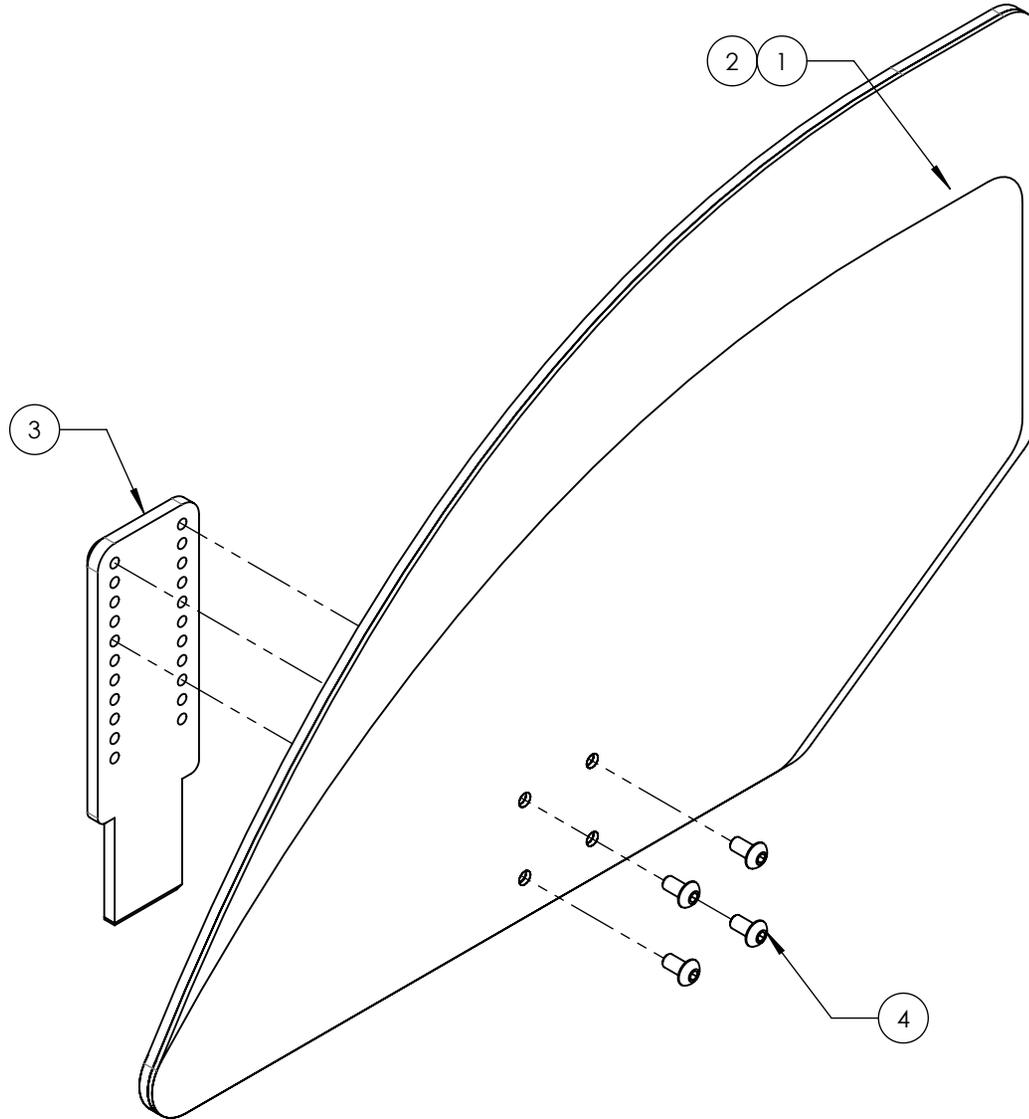

9001295A-00
 PROTÈGE-VÊTEMENT - PLASTIQUE, DROITE,
 PETIT

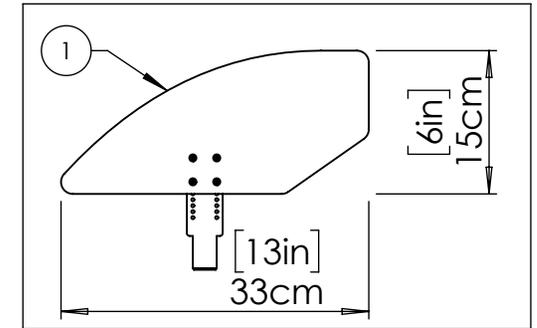


9001296A-00
 PROTÈGE-VÊTEMENT - PLASTIQUE, DROITE,
 MOYEN

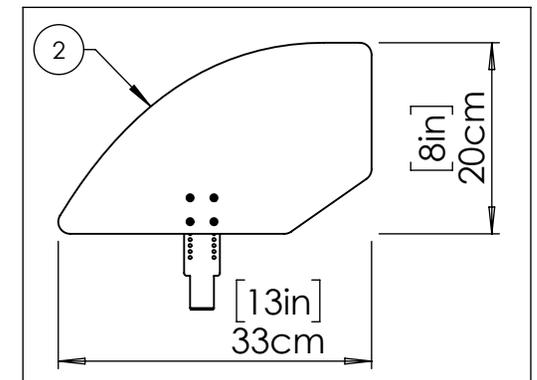


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9001297A_9001298A
PROTÈGE-VÊTEMENTS - PLASTIQUE, AMOVIBLE, GAUCHE


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9001297	9001298
1	0051002A-00	PROTÈGE-VÊTEMENT PLASTIQUE PETIT - ASSY	1	-
2	0051003A-00	PROTÈGE-VÊTEMENT PLASTIQUE MOYEN - ASSY	-	1
3	0051118A-00	PLAQUE AJUSTEMENT GARDE BOUE & PROTÈGE VÊTEMENT	1	1
4	0090631A-00	VIS TÊTE BOMBÉE M4x0.7x8mm L	4	4

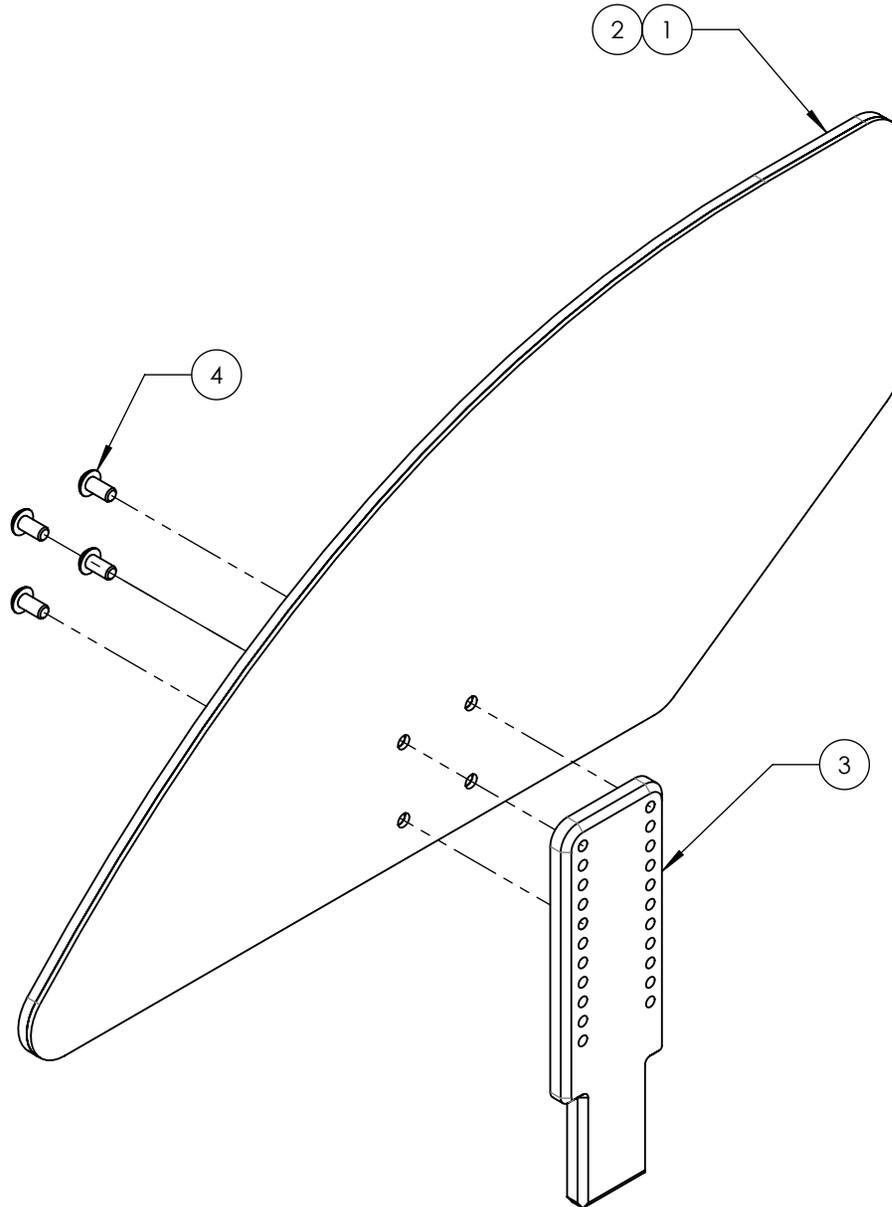

9001297A-00
 PROTÈGE-VÊTEMENT - PLASTIQUE, GAUCHE, PETIT

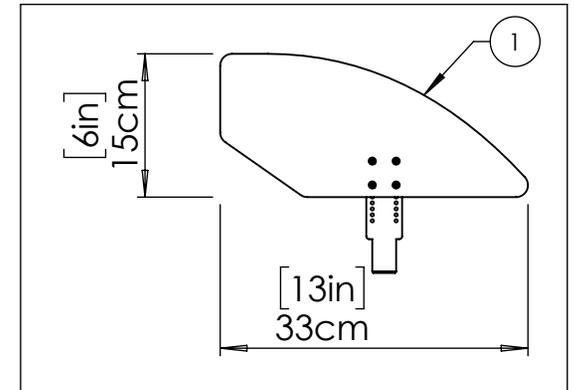


9001298A-00
 PROTÈGE-VÊTEMENT - PLASTIQUE, GAUCHE, MOYEN

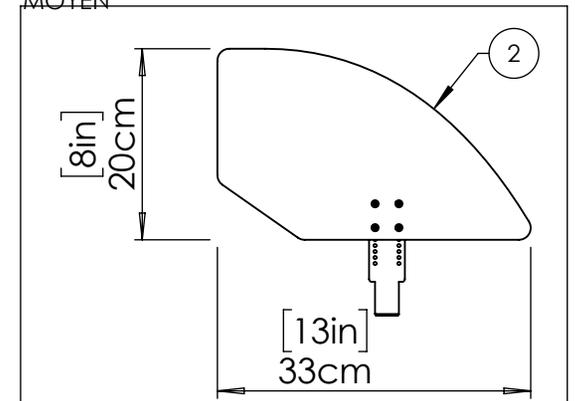


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9001319A_9001321A
GARDE-BOUE - FIBRE DE CARBONE, DROIT


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9001319	9001320	9001321
1	0051106A-00	GARDE BOUE CARBONE PETIT, DROITE	1	-	-
2	0051108A-00	GARDE BOUE CARBONE MOYEN, DROITE	-	1	-
3	0051110A-00	GARDE BOUE CARBONE GRAND, DROITE	-	-	1
4	0090631A-00	VIS TÊTE BOMBÉE M4x0.7x8mm L	4	4	4
5	0051118A-00	PLAQUE AJUSTEMENT GARDE BOUE & PROTÈGE VÊTEMENT	1	1	1

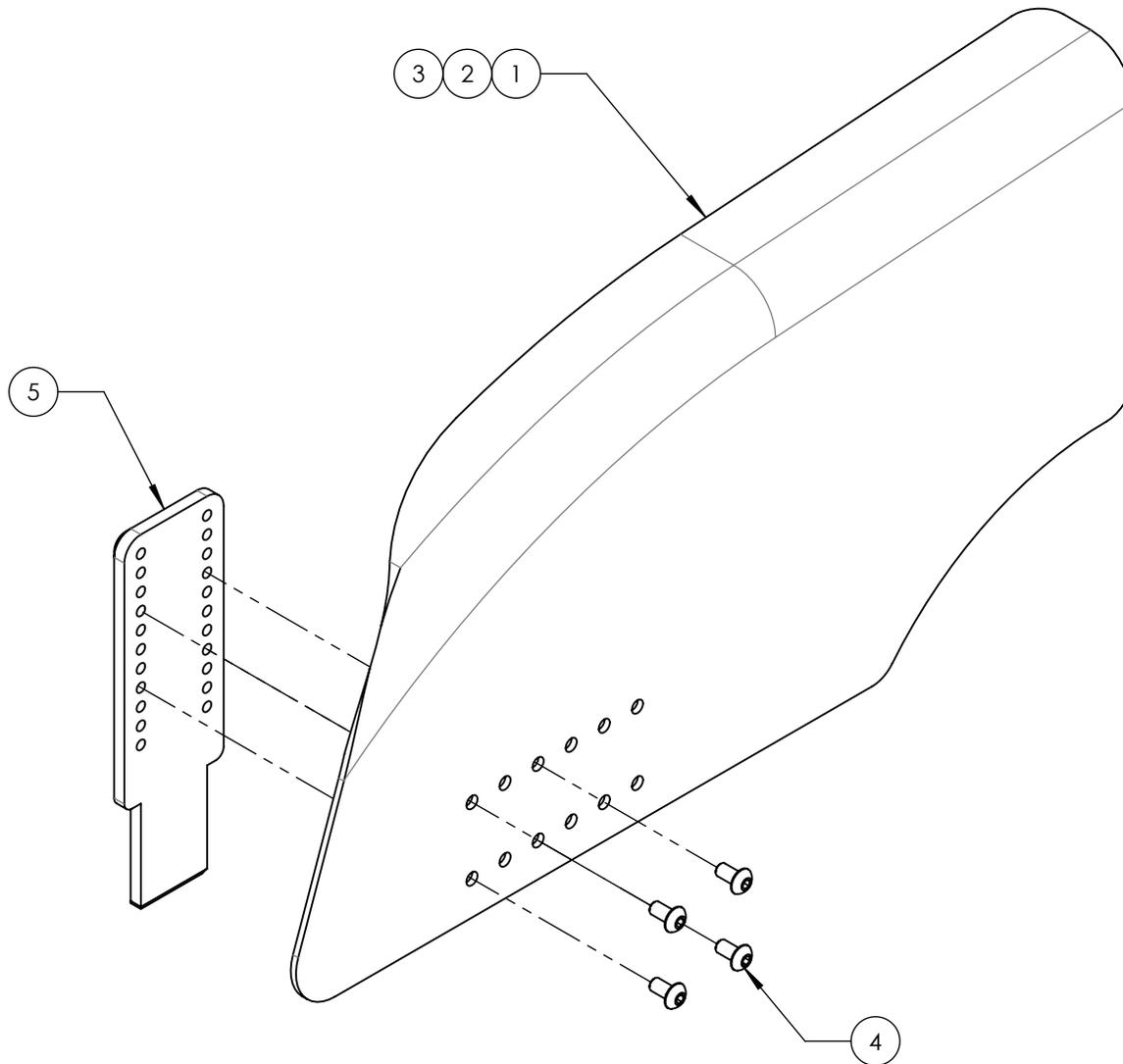


9001319A-00
 GARDE-BOUE - CARBONE, DROITE,
 PETIT

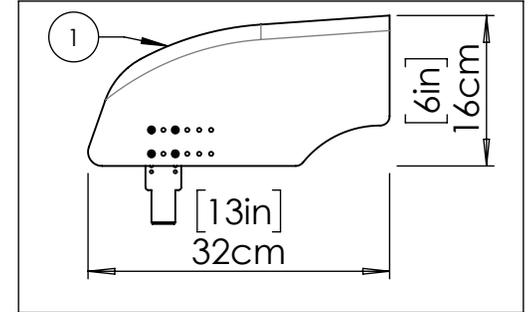

9001320A-00
 GARDE-BOUE - CARBONE, DROITE,
 MOYEN

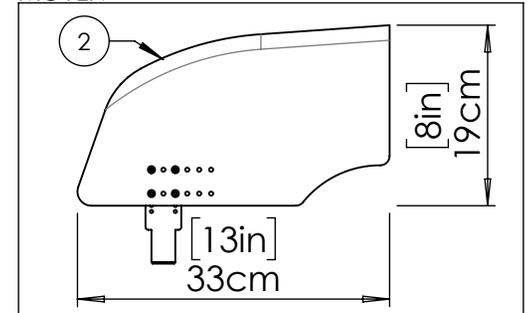


9001321A-00
 GARDE-BOUE - CARBONE, DROITE, GRAND

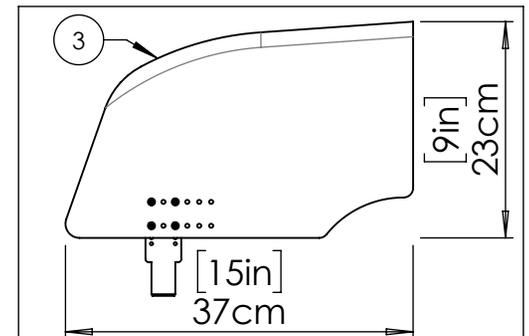


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9001322A_9001324A
GARDE-BOUE - FIBRE DE CARBONE, GAUCHE


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9001322	9001323	9001324
1	0051107A-00	GARDE BOUE CARBONE PETIT, GAUCHE	1	-	-
2	0051109A-00	GARDE BOUE CARBONE MOYEN, GAUCHE	-	1	-
3	0051111A-00	GARDE BOUE CARBONE GRAND, GAUCHE	-	-	1
4	0051118A-00	PLAQUE AJUSTEMENT GARDE BOUE & PROTÈGE VÊTEMENT	1	1	1
5	0090631A-00	VIS TÊTE BOMBÉE M4x0.7x8mm L	4	4	4

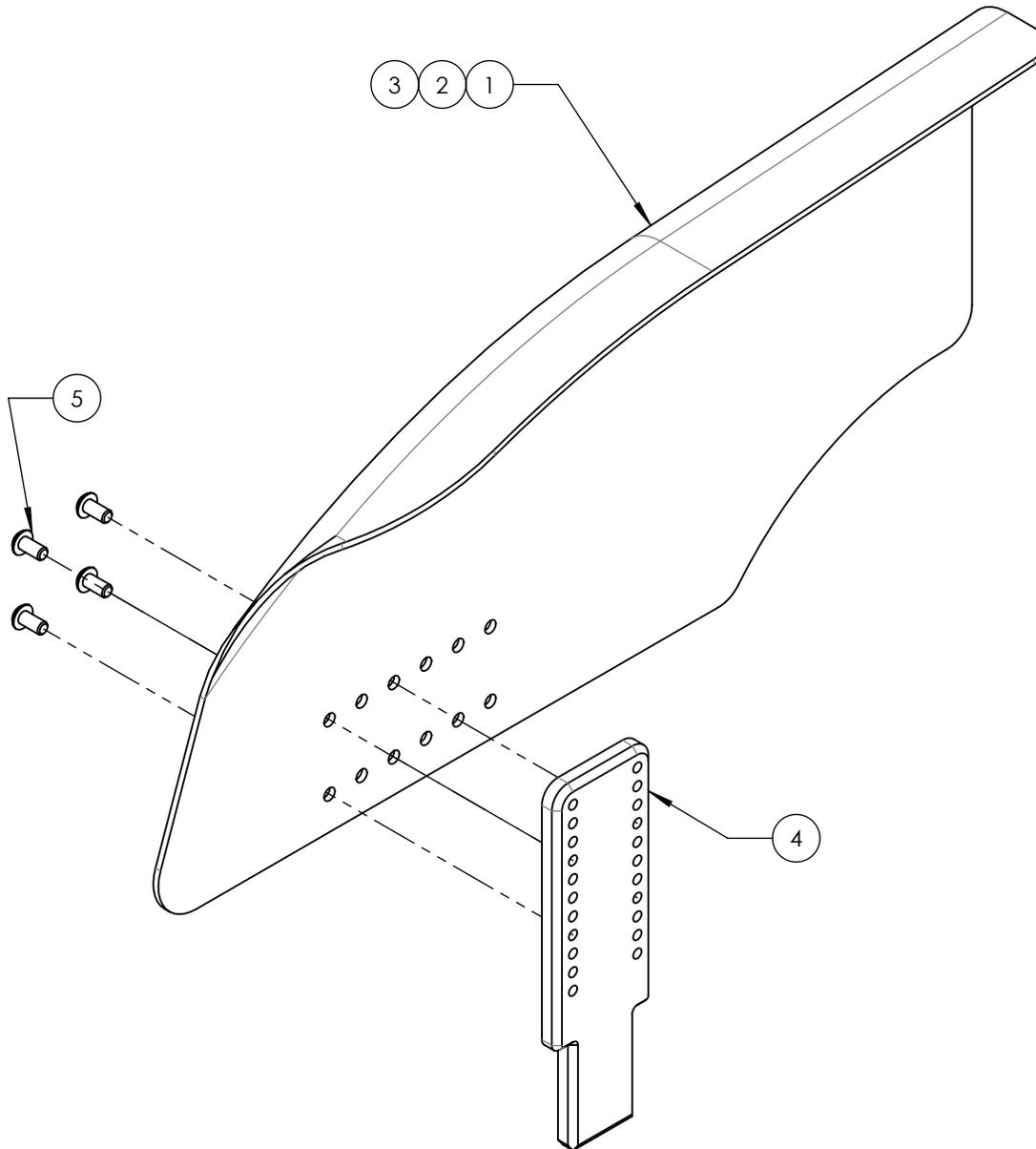


9001322A-00
 FENDER SIDE GUARD - CARBON, LEFT, SMALL

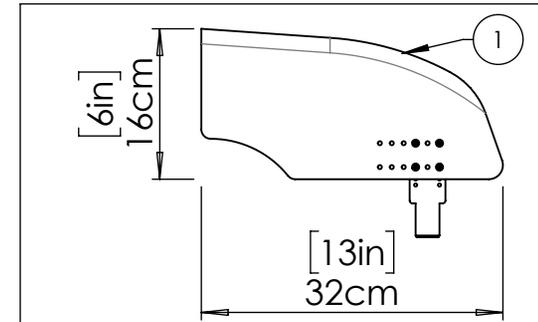

9001323A-00
 FENDER SIDE GUARD - CARBON, LEFT, MEDIUM

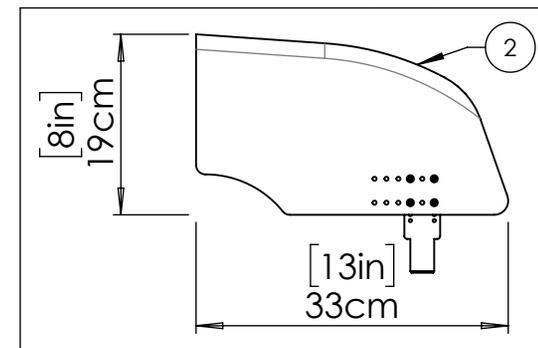




9001324A-00
 FENDER SIDE GUARD - CARBON, LEFT, LARGE

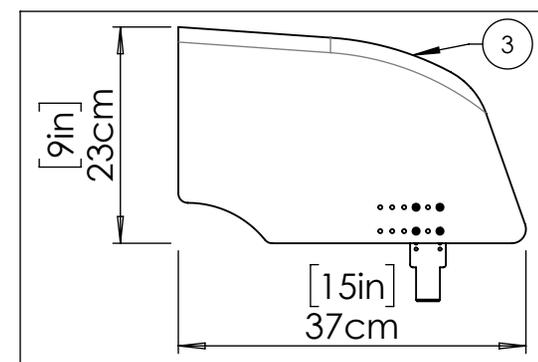

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9001327A-00
RÉCEPTACLE - PROTÈGE-VÊTEMENT & GARDE-BOUE

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0033557A-00	RECEPTACLE PROTÈGE VÊTEMENT V2 - ASSEMBLAGE	1
2	0090748A-00	VIS TÊTE CYLIND M5x0.8x18mm L	2

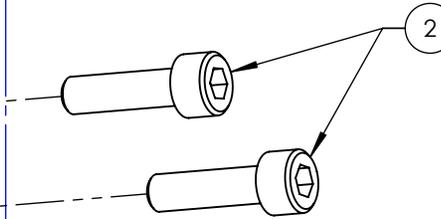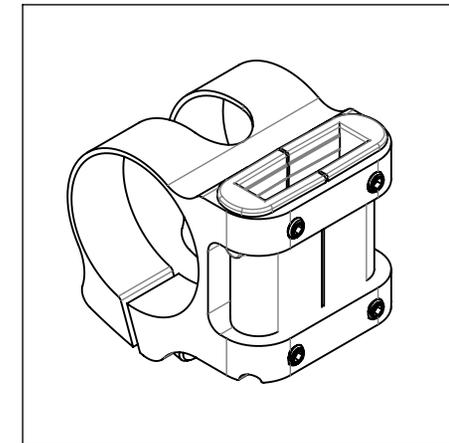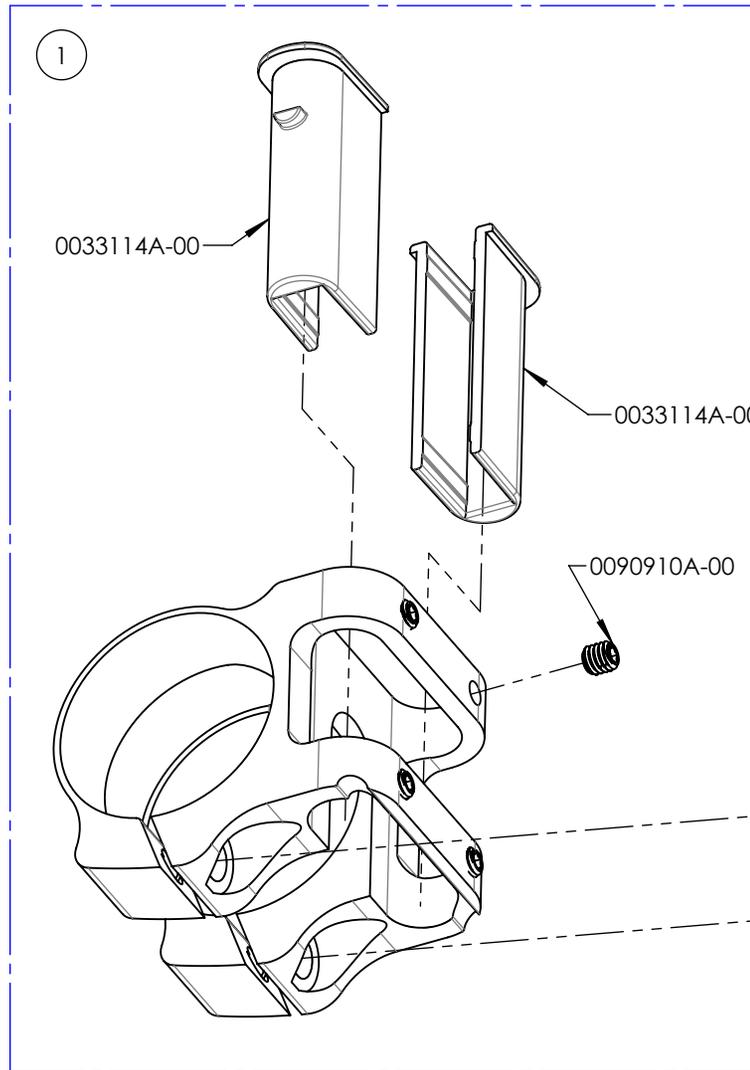


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


9002489A 9002491A
PROTÈGE-VÊTEMENTS - FIBRE DE CARBONE, AMOVIBLE, DROIT

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9002489	9002490	9002491
1	0051213B-00	PROTÈGE-VÊTEMENT CARBONE AJUST PETIT - ASSY	1	-	-
2	0051214B-00	PROTÈGE-VÊTEMENT CARBONE AJUST MOYEN - ASSY	-	1	-
3	0051215B-00	PROTÈGE-VÊTEMENT CARBONE AJUST GRAND - ASSY	-	-	1
4	0051118A-00	PLAQUE AJUSTEMENT GARDE BOUE & PROTÈGE VÊTEMENT	1	1	1
5	0090631A-00	VIS TÊTE BOMBÉE M4x0.7x8mm L	4	4	4



9002489A-00
 PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, DROITE, PETIT

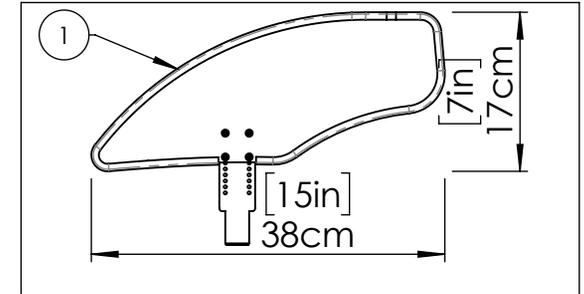

9002490A-00
 PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, DROITE, MOYEN

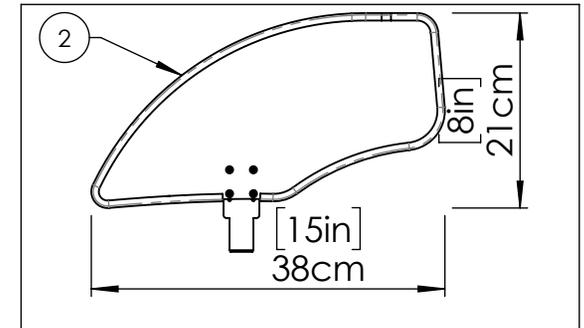


9002491A-00
 PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, DROITE, GRAND

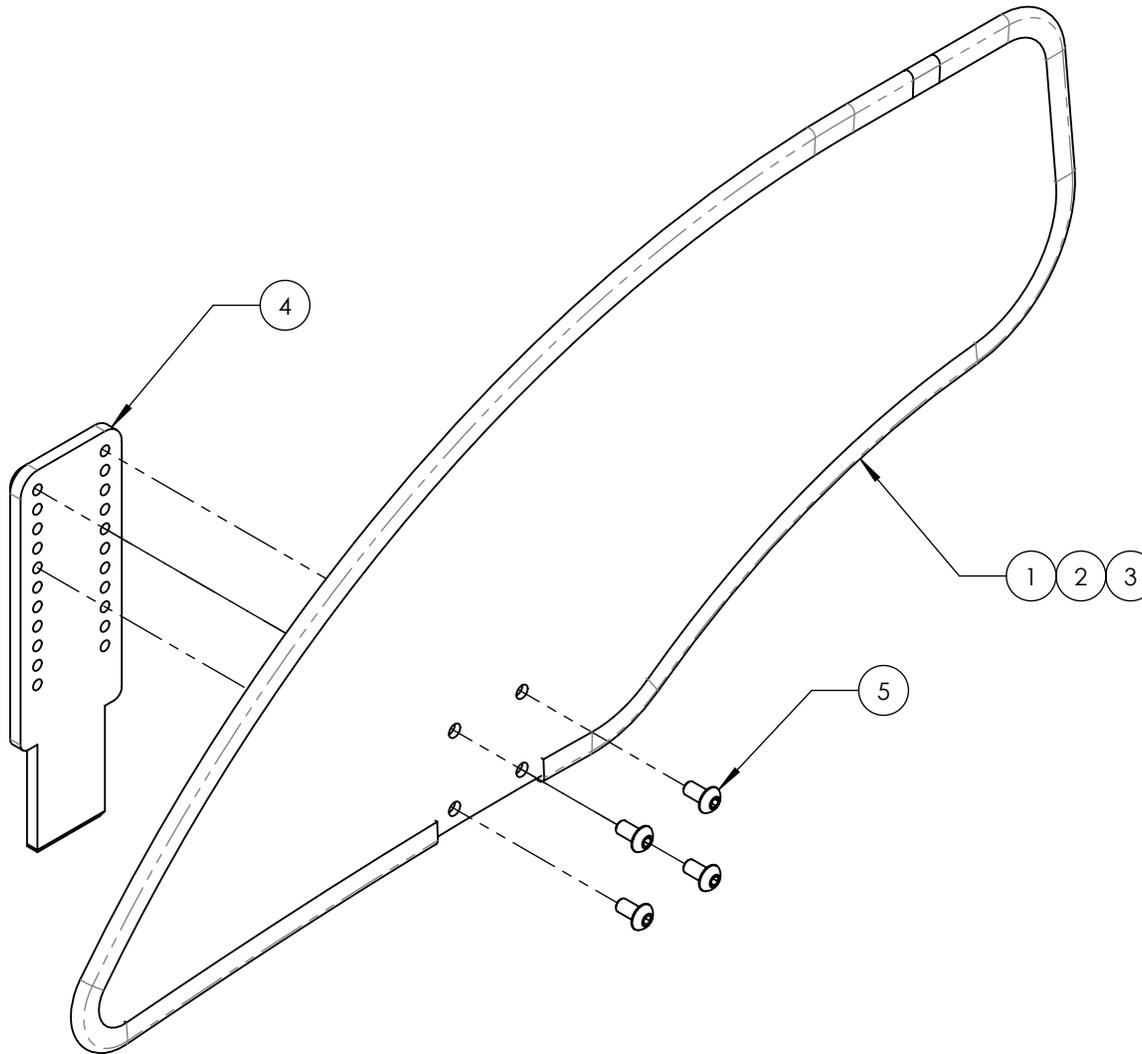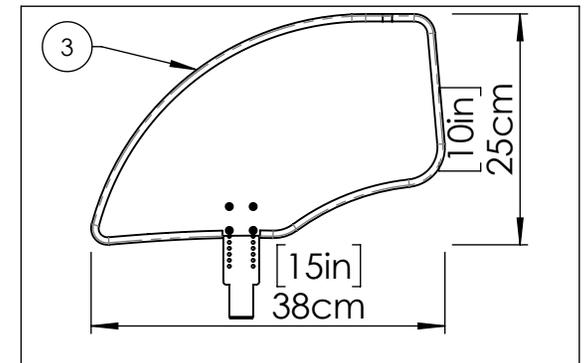


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9002492A_9002494A
PROTÈGE-VÊTEMENTS - FIBRE DE CARBONE, AMOVIBLE, GAUCHE


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9002492	9002493	9002494
1	00512138-00	PROTÈGE-VÊTEMENT CARBONE AJUST PETIT - ASSY	1	-	-
2	00512148-00	PROTÈGE-VÊTEMENT CARBONE AJUST MOYEN - ASSY	-	1	-
3	00512158-00	PROTÈGE-VÊTEMENT CARBONE AJUST GRAND - ASSY	-	-	1
4	0051118A-00	PLAQUE AJUSTEMENT GARDE BOUE & PROTÈGE VÊTEMENT	1	1	1
5	0090631A-00	VIS TÊTE BOMBÉE M4x0.7x8mm L	4	4	4

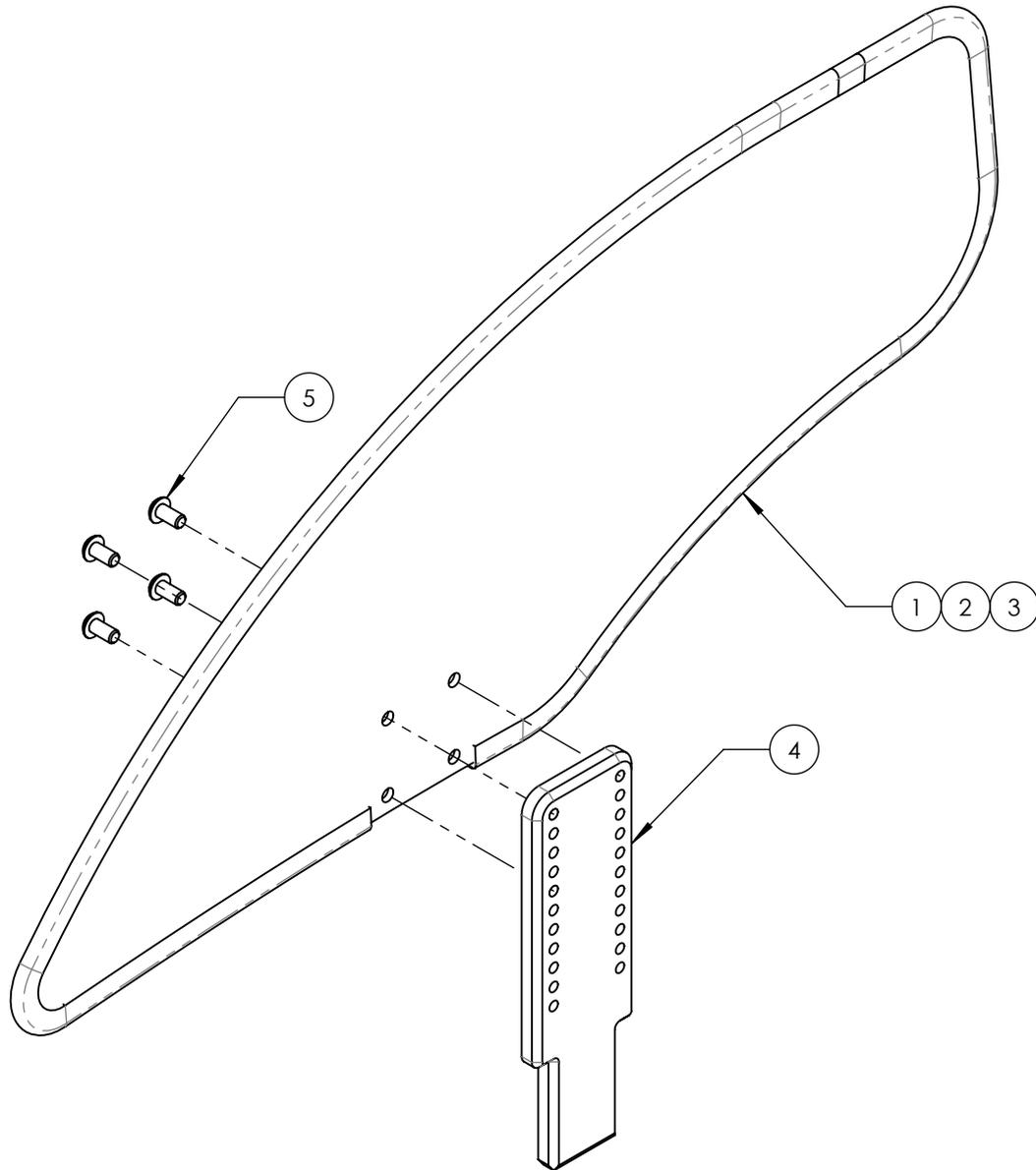


9002492A-00
 PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, GAUCHE, PETIT

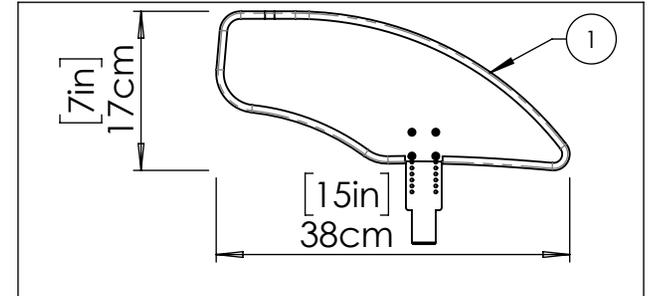

9002493A-00
 PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, GAUCHE, MOYEN

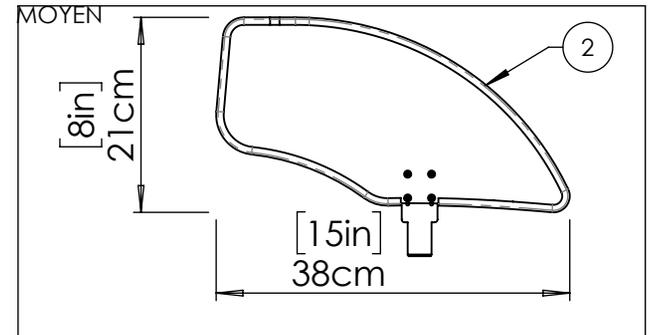


9002494A-00
 PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, GAUCHE, GRAND

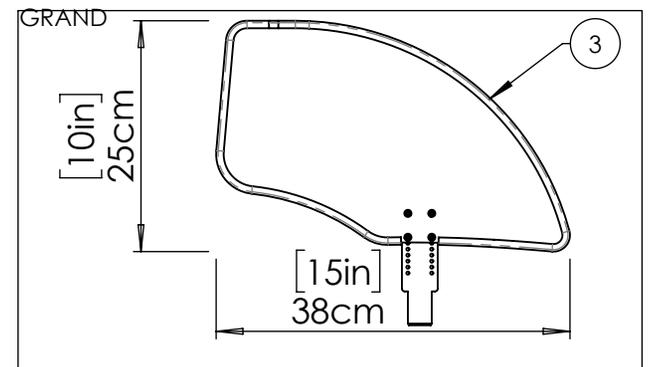


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9007638A 9007641A
GARDE-BOUE - PLASTIQUE, DÉCALÉ, DROIT


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9007638	9007639	9007640	9007641
1	0051385A-00	GARDE-BOUE PLASTIQUE X-PETIT, DROITE	1	-	-	-
2	0051386A-00	GARDE-BOUE PLASTIQUE PETIT, DROITE	-	1	-	-
3	0051387A-00	GARDE-BOUE PLASTIQUE MOYEN, DROITE	-	-	1	-
4	0051388A-00	GARDE-BOUE PLASTIQUE GRAND, DROITE	-	-	-	1
5	0051394A-00	PLAQUE AJUSTABLE DÉCALÉE GARDE-BOUE	1	1	1	1
6	0051395A-00	PLAQUE INT. GARDE-BOUE	1	1	1	1
7	0090723A-00	VIS TÊTE CYLIND M4x0.7x8mm L	4	4	4	4

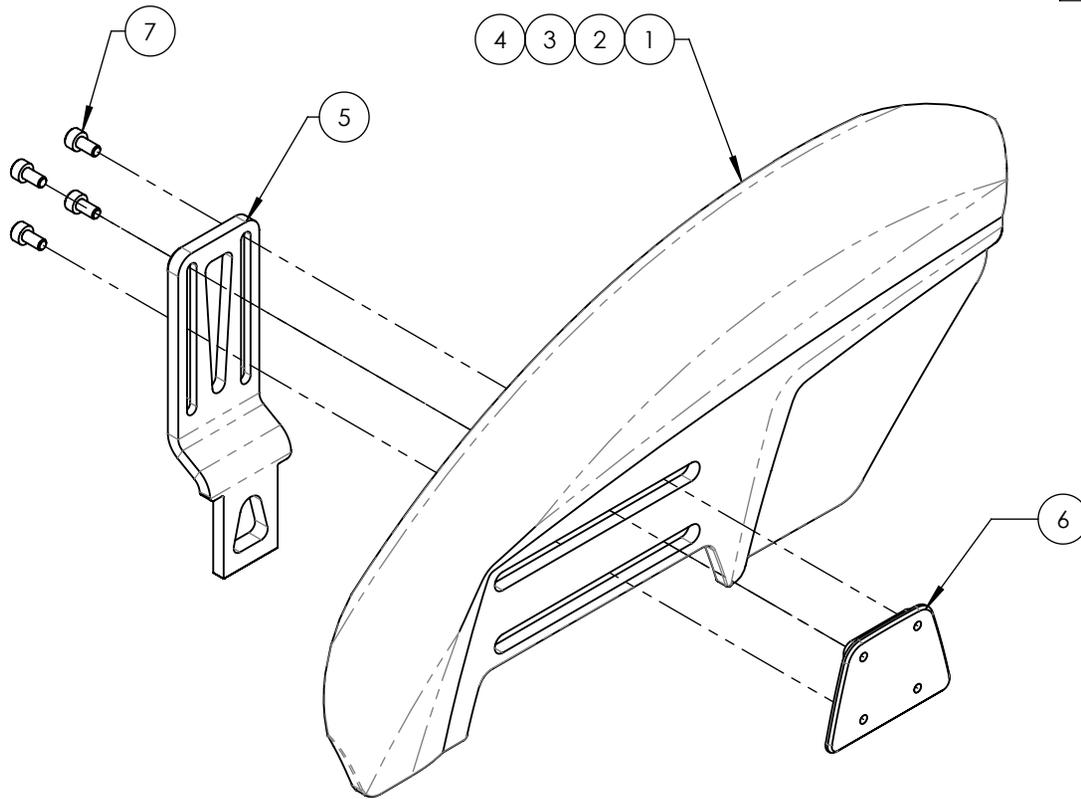


9007638
 GARDE-BOUE - PLASTIQUE, DÉCALÉ, DROITE, X-PETIT

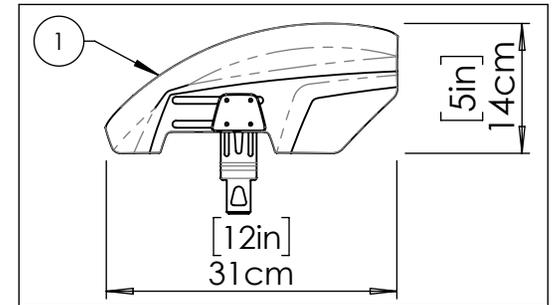


9007639
 GARDE-BOUE - PLASTIQUE, DÉCALÉ, DROITE, PETIT

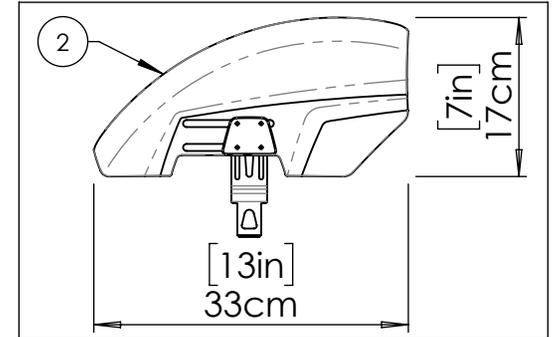

9007641
 GARDE-BOUE - PLASTIQUE, DÉCALÉ,
 DROITE, GRAND

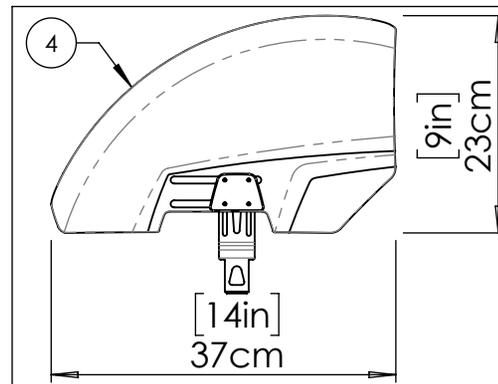


9007640
 GARDE-BOUE - PLASTIQUE, DÉCALÉ, DROITE, MOYEN

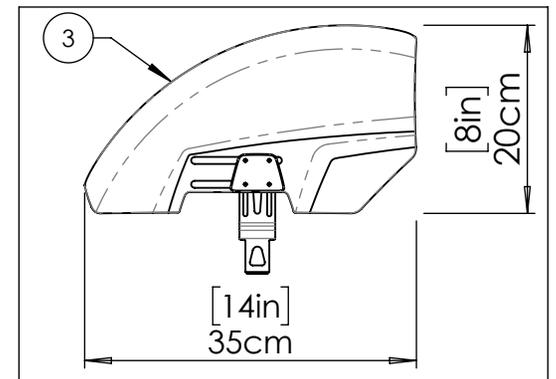


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9007642A 9007645A
GARDE-BOUE - PLASTIQUE, DÉCALÉ, GAUCHE


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9007642	9007643	9007644	9007645
1	0051389A-00	GARDE-BOUE PLASTIQUE X-PETIT, GAUCHE	1	-	-	-
2	0051390A-00	GARDE-BOUE PLASTIQUE PETIT, GAUCHE	-	1	-	-
3	0051391A-00	GARDE-BOUE PLASTIQUE MOYEN, GAUCHE	-	-	1	-
4	0051392A-00	GARDE-BOUE PLASTIQUE GRAND, GAUCHE	-	-	-	1
5	0051394A-00	PLAQUE AJUSTABLE DÉCALÉE GARDE-BOUE	1	1	1	1
6	0051395A-00	PLAQUE INT. GARDE-BOUE	1	1	1	1
7	0090723A-00	VIS TÊTE CYLIND M4x0.7x8mm L	4	4	4	4

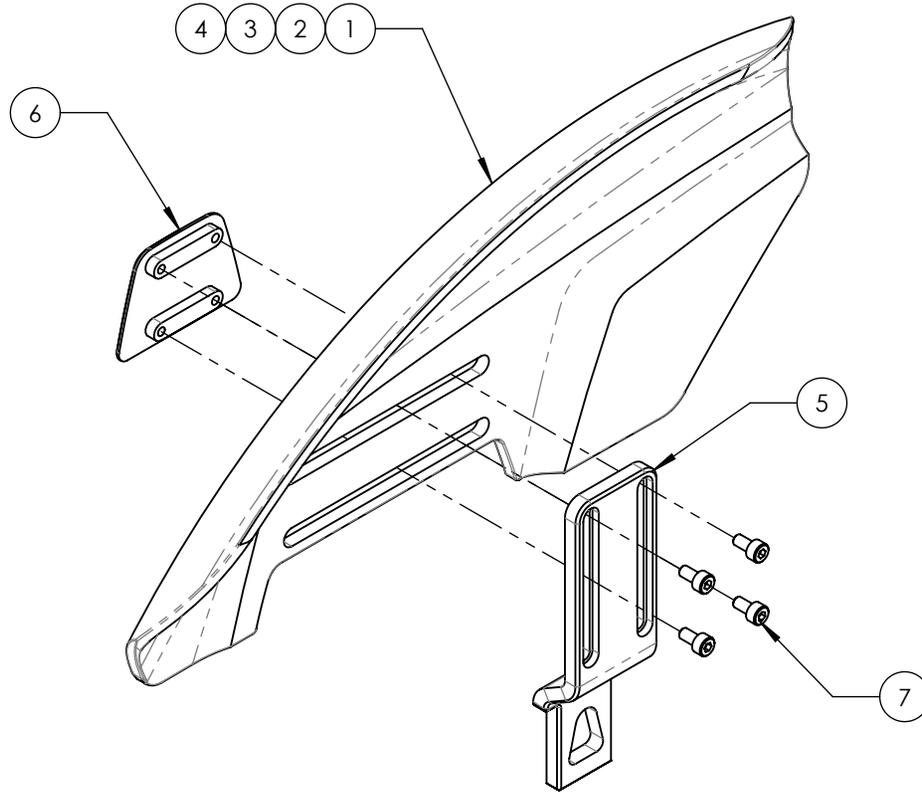


9007642
 GARDE-BOUE - PLASTIQUE, DÉCALÉ, GAUCHE, X-PETIT

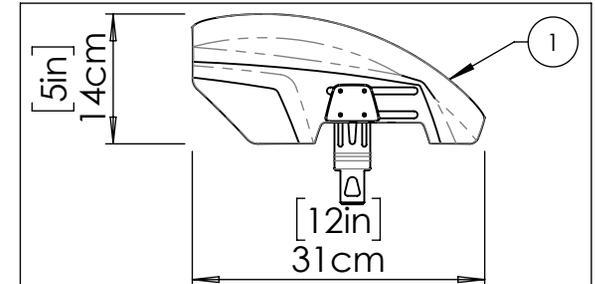


9007643
 GARDE-BOUE - PLASTIQUE, DÉCALÉ, GAUCHE, PETIT

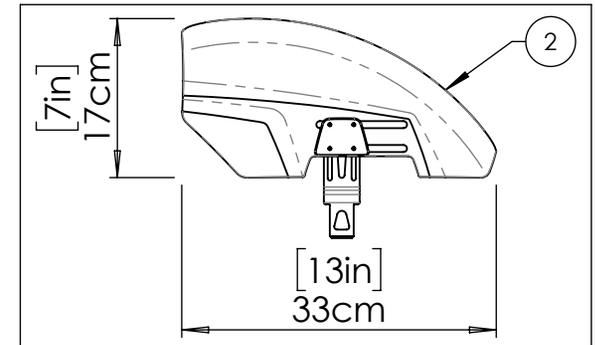

9007645
 GARDE-BOUE - PLASTIQUE, DÉCALÉ, GAUCHE, GRAND

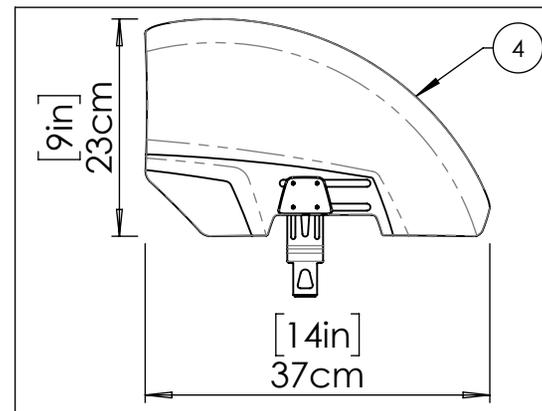


9007644
 GARDE-BOUE - PLASTIQUE, DÉCALÉ, GAUCHE, MOYEN

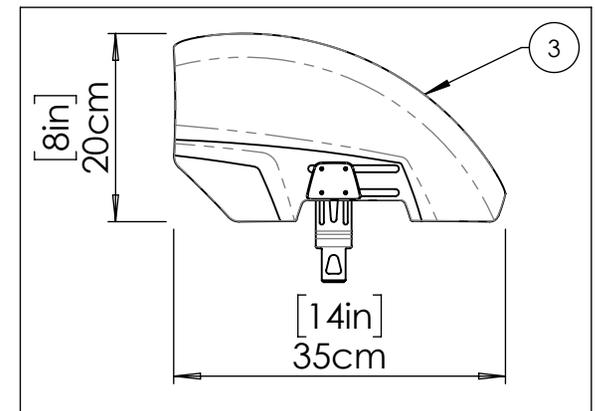

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

Catalogue de protège-vêtements
Garde-boues



NO. ITEM	NO. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	9007638 A-00	GARDE-BOUE - PLASTIQUE, DÉCALÉ, DROITE, X-PETIT	1
2	9007642 A-00	GARDE-BOUE - PLASTIQUE, DÉCALÉ, GAUCHE, X-PETIT	1
3	9007639 A-00	GARDE-BOUE - PLASTIQUE, DÉCALÉ, DROITE, PETIT	1
4	9007643 A-00	GARDE-BOUE - PLASTIQUE, DÉCALÉ, GAUCHE, PETIT	1
5	9007640 A-00	GARDE-BOUE - PLASTIQUE, DÉCALÉ, DROITE, MOYEN	1
6	9007644 A-00	GARDE-BOUE - PLASTIQUE, DÉCALÉ, GAUCHE, MOYEN	1
7	9007641 A-00	GARDE-BOUE - PLASTIQUE, DÉCALÉ, DROITE, GRAND	1
8	9007645 A-00	GARDE-BOUE - PLASTIQUE, DÉCALÉ, GAUCHE, GRAND	1
9	9001319 A-00	GARDE-BOUE - CARBONE, DROITE, PETIT	1
10	9001322 A-00	GARDE-BOUE - CARBONE, GAUCHE, PETIT	1
11	9001320 A-00	GARDE-BOUE - CARBONE, DROITE, MOYEN	1
12	9001323 A-00	GARDE-BOUE - CARBONE, GAUCHE, MOYEN	1
13	9001321 A-00	GARDE-BOUE - CARBONE, DROITE, GRAND	1
14	9001324 A-00	GARDE-BOUE - CARBONE, GAUCHE, GRAND	1

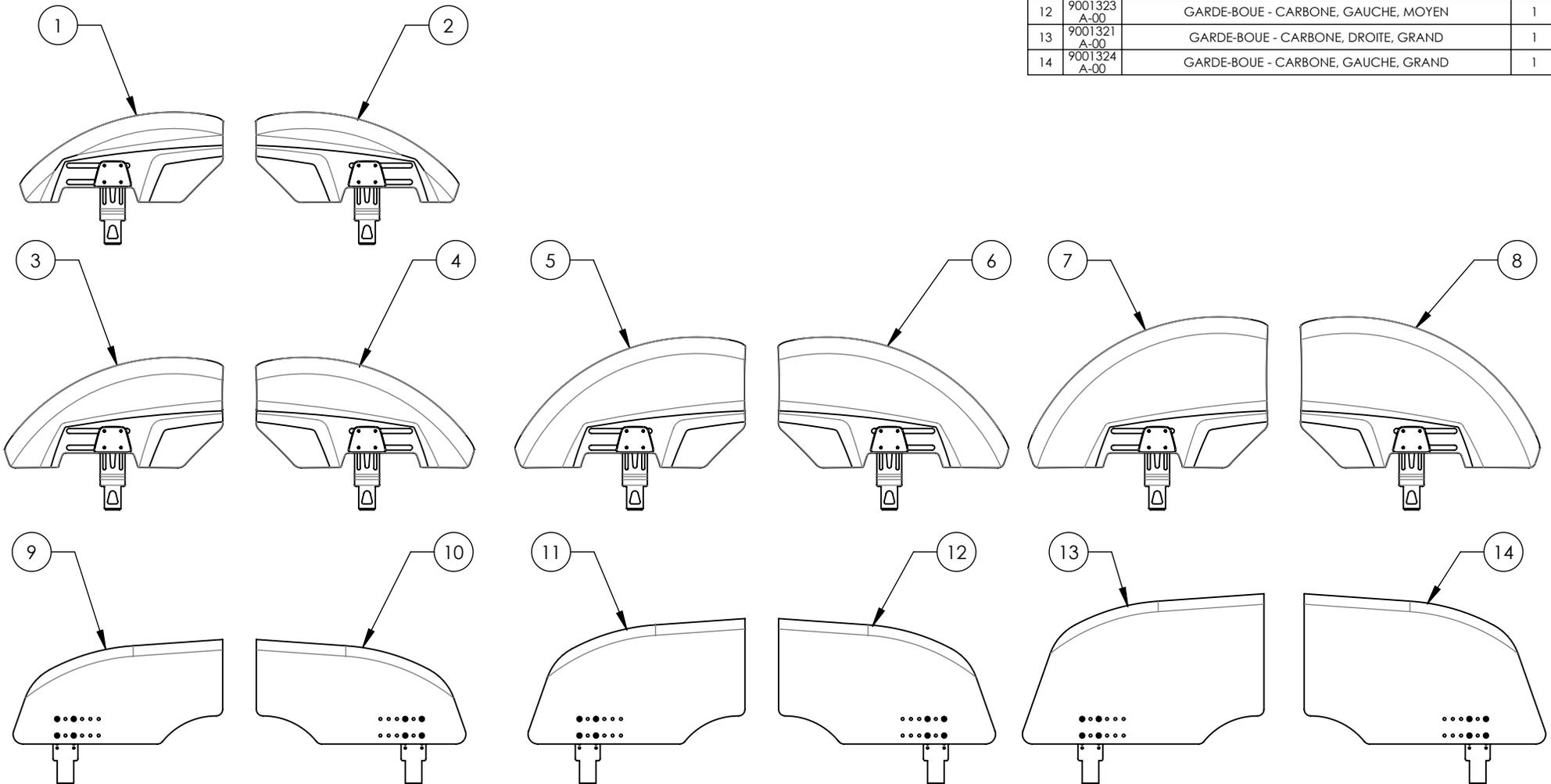

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

Catalogue de protège-vêtements
Bague pour protège-vêtements et garde-boue

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	9001327A-00	RÉCEPTACLE - PROTÈGE-VÊTEMENT & GARDE-BOUE	2




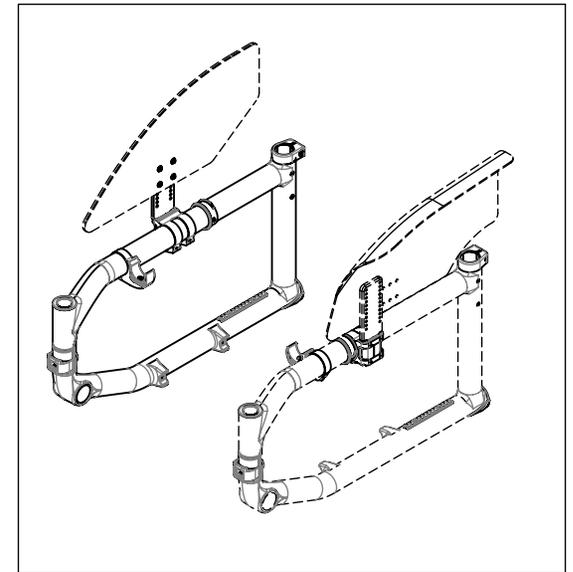
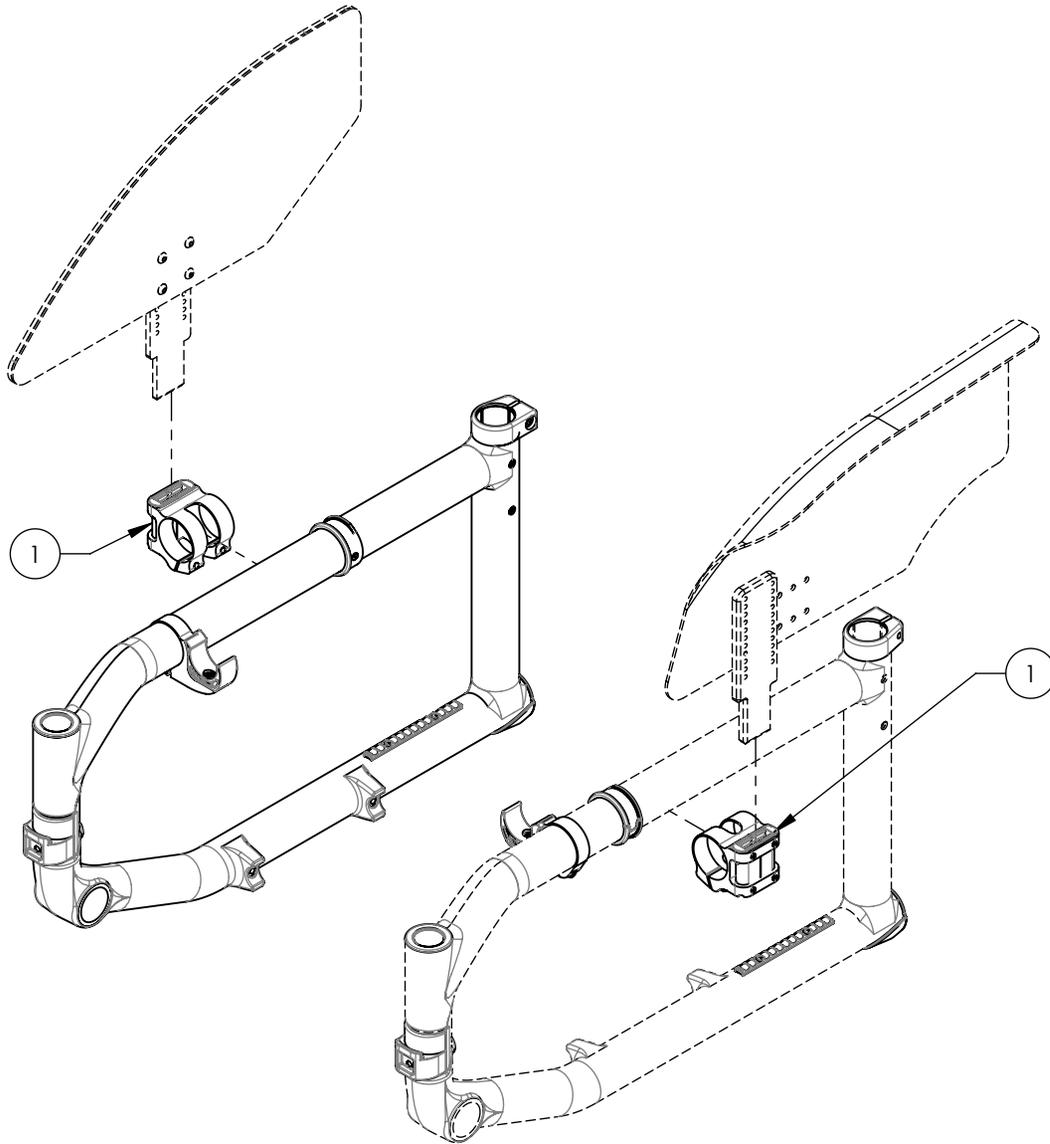


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

Catalogue de protège-vêtements
Brides pour protège-vêtements et garde-boue

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0002174B-00	LANGUETTE PROTÈGE-VÊTEMENTS - ASSY	2
2	0003790A-00	BRIDE PROTÈGE-VÊTEMENTS DÉPORTÉE ARR. - ASSY	2
3	0003791A-00	BRIDE GARDE-BOUE DÉCALÉ - ASSY	2
4	0003792A-00	BRIDE PROTÈGE-VÊTEMENTS RABATTABLE - ASSY	2


OPTIONS	BRIDE À UTILISER
PROTÈGE-VÊTEMENTS PLASTIQUE/CARBONE	0002174B-00
GARDE-BOUE PLASTIQUE SANS APPUIE-BRAS EN L	0003790A-00
GARDE-BOUE PLASTIQUE AVEC APPUIE-BRAS EN L	0003792A-00
GARDE-BOUE PLASTIQUE DÉCALÉ SANS APPUIE-BRAS EN L	0003791A-00
GARDE-BOUE PLASTIQUE DÉCALÉ AVEC APPUIE-BRAS EN L	N/D
GARDE-BOUE CARBONE	0003790A-00

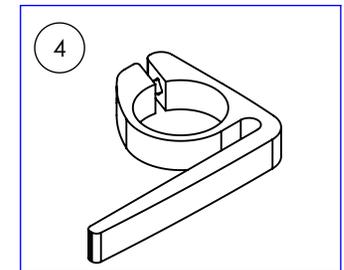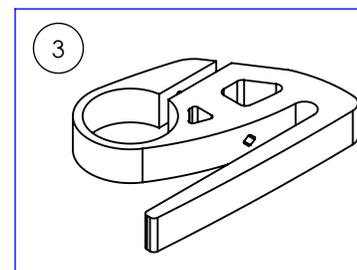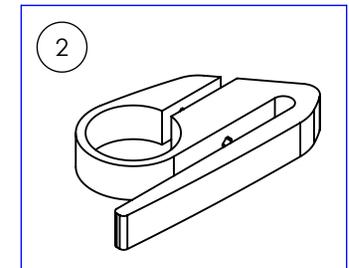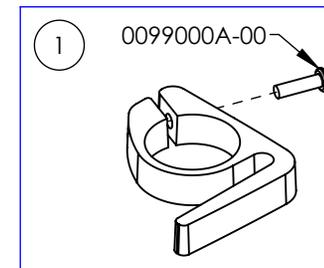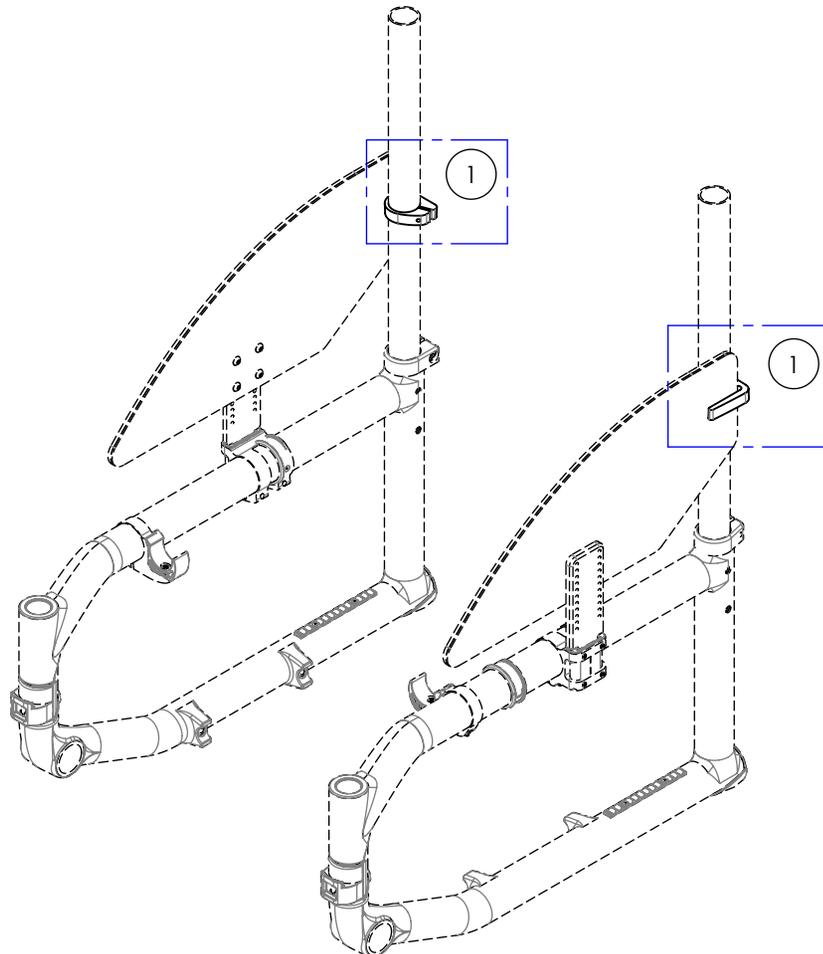

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

Catalogue de protège-vêtements
Protège-vêtements souple









No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0051004A-00	PROTEGE VETEMENT SOUPLE	1

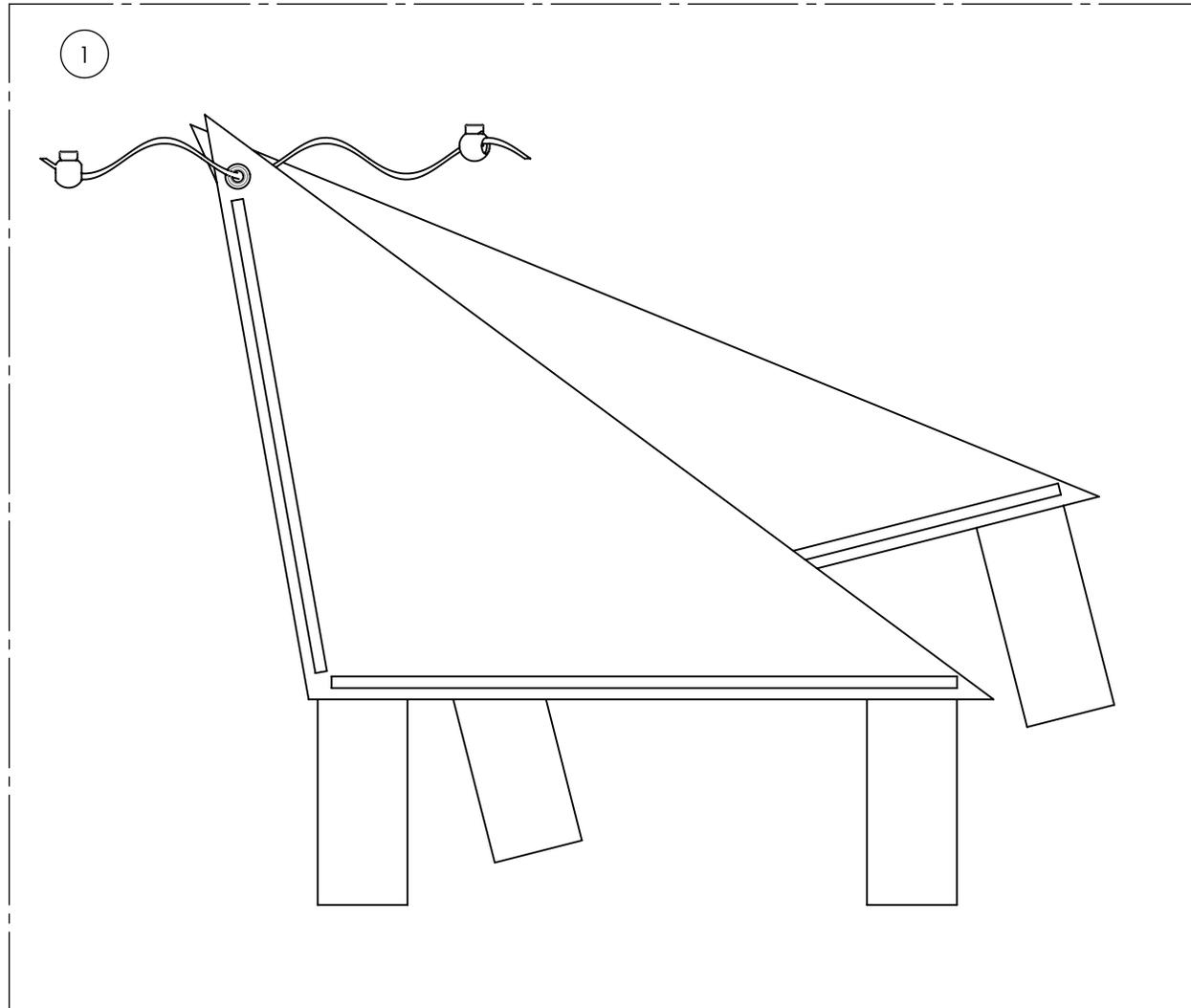

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

Catalogue de protège-vêtements Protège-vêtements

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	9001295A-00	PROTÈGE-VÊTEMENT - PLASTIQUE, DROITE, PETIT	1
2	9001297A-00	PROTÈGE-VÊTEMENT - PLASTIQUE, GAUCHE, PETIT	1
3	9001296A-00	PROTÈGE-VÊTEMENT - PLASTIQUE, DROITE, MOYEN	1
4	9001298A-00	PROTÈGE-VÊTEMENT - PLASTIQUE, GAUCHE, MOYEN	1
5	9002489A-00	PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, DROITE, PETIT	1
6	9002492A-00	PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, GAUCHE, PETIT	1
7	9002490A-00	PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, DROITE, MOYEN	1
8	9002493A-00	PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, GAUCHE, MOYEN	1
9	9002491A-00	PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, DROITE, GRAND	1
10	9002494A-00	PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, GAUCHE, GRAND	1
11*	9001289A-00	PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, FIXE, DROITE, PETIT	1
12*	9001292A-00	PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, FIXE, GAUCHE, PETIT	1
13*	9001290A-00	PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, FIXE, DROITE, MOYEN	1
14*	9001293A-00	PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, FIXE, GAUCHE, MOYEN	1
15*	9001291A-00	PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, FIXE, DROITE, GRAND	1
16*	9001294A-00	PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, FIXE, GAUCHE, GRAND	1

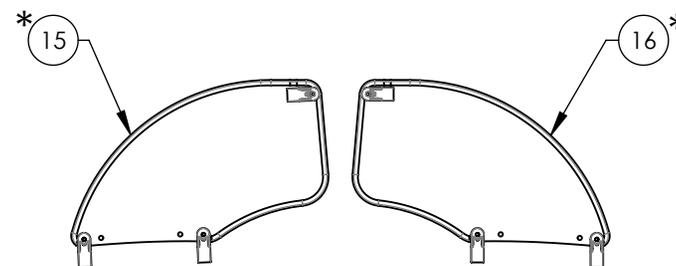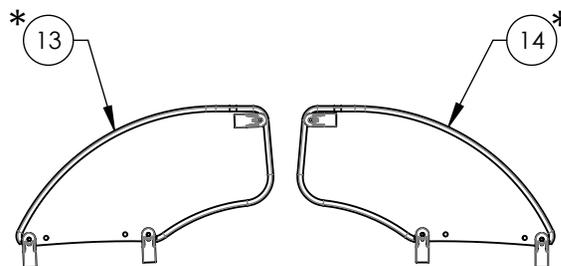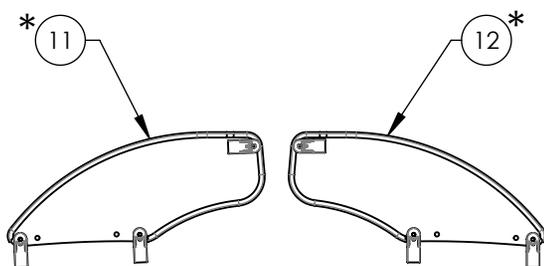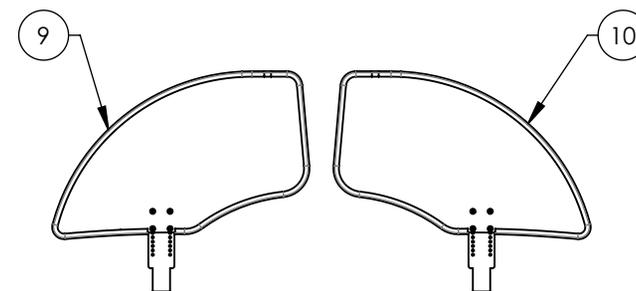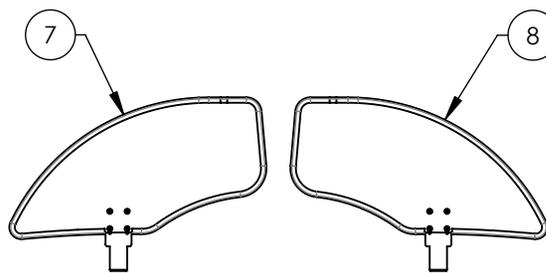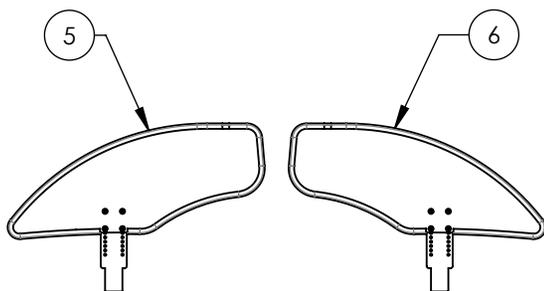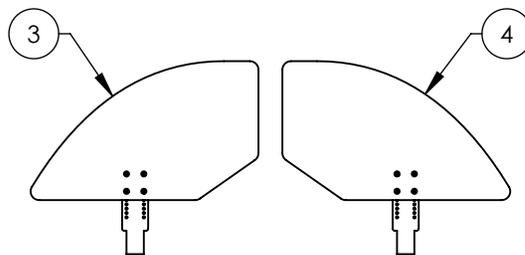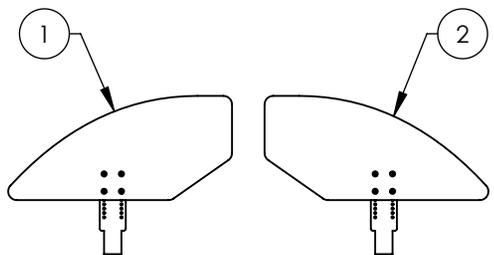


*:NON DISPONIBLE POUR LES FAUTEUILS HELIO K ET APEX

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


9001587B_9001588B
CEINTURE DE POSITIONNEMENT 35 po

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9001588	9001587
1	0051027B-00	ASSEMBLAGE DE CEINTURE DE POSITIONNEMENT	1	-
2	0051589A-00	CEINTURE VELCRO 35po - ASSEMBLAGE	-	1
3	0060500A-00	FRAME SAVER (SAC DE 2 / 60201)	1	1

9001587B-00
 CEINTURE - TYPE VELCRO, 35po

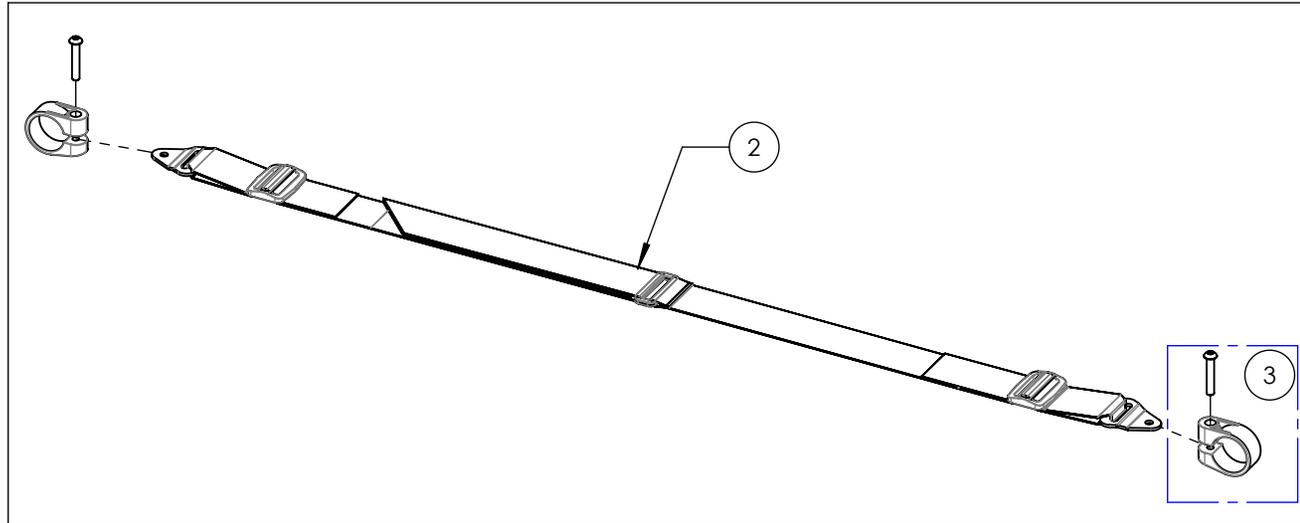

9001588B-00
 CEINTURE - TYPE AUTO, 35po

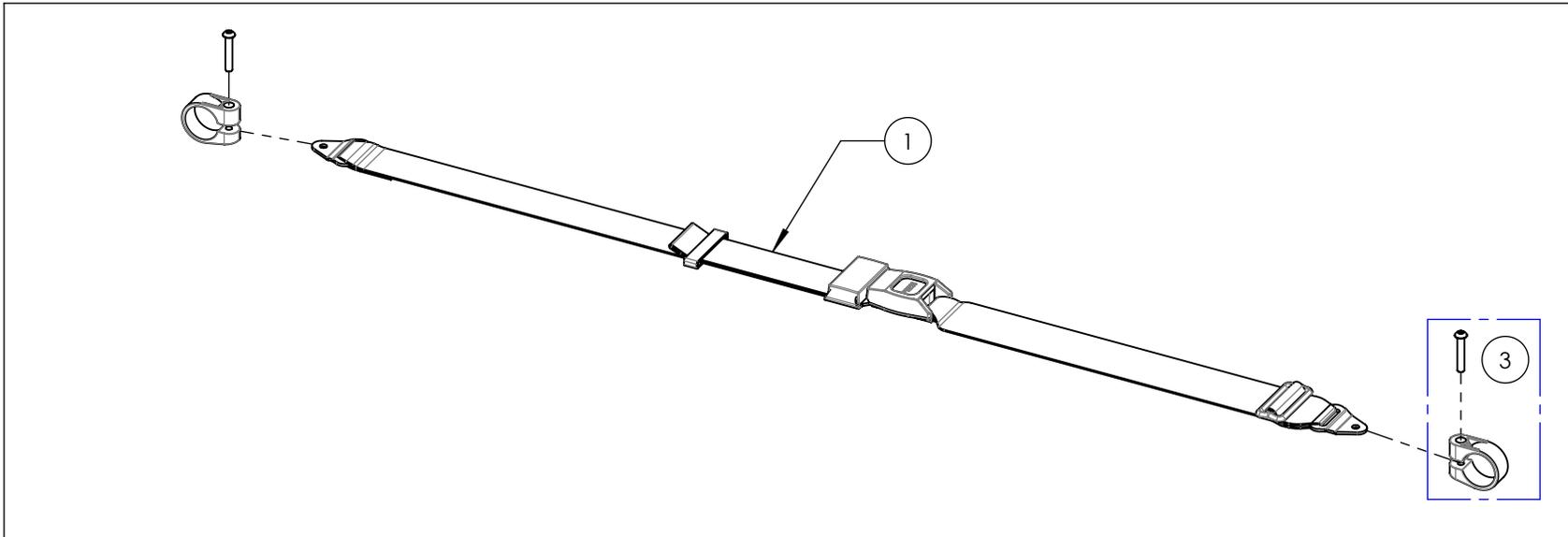


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


9002138A 9002139A
CEINTURE DE POSITIONNEMENT 60 PO

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9002138	9002139
1	0051584A-00	CEINTURE VELCRO 60po - ASSEMBLAGE	1	-
2	0051583A-00	CEINTURE DE POSITIONNEMENT 60po - ASSEMBLAGE	-	1
3	0060500A-00	FRAME SAVER (SAC DE 2 / 60201)	1	1

9002138A-00
 SEATBELT - VELCRO ADJ, 60in

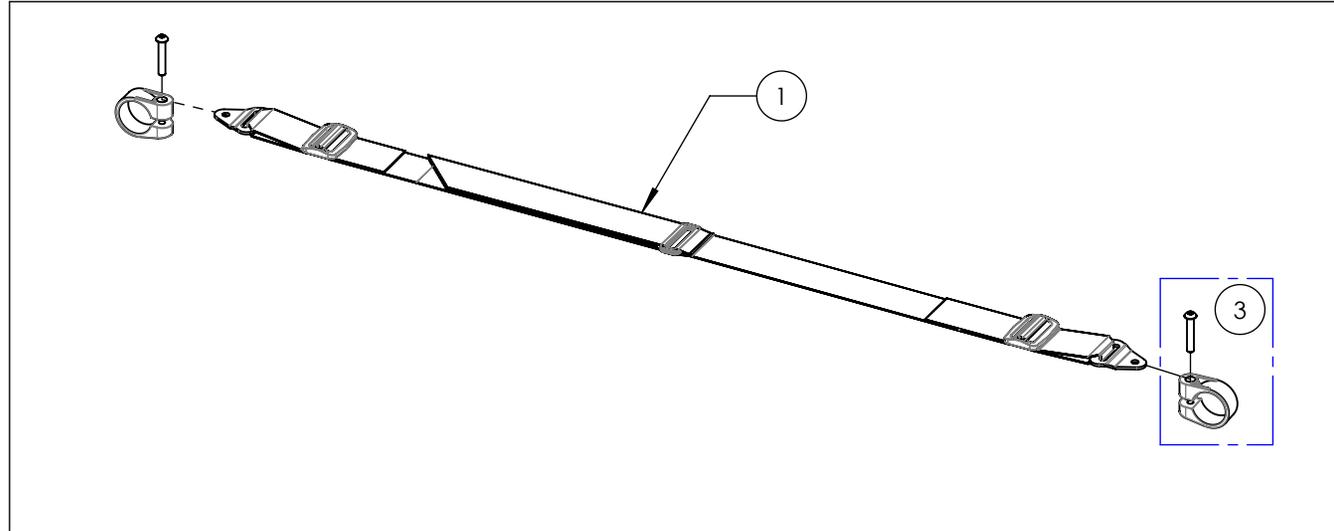


9002139A-00
 CEINTURE - TYPE AUTO, 60po

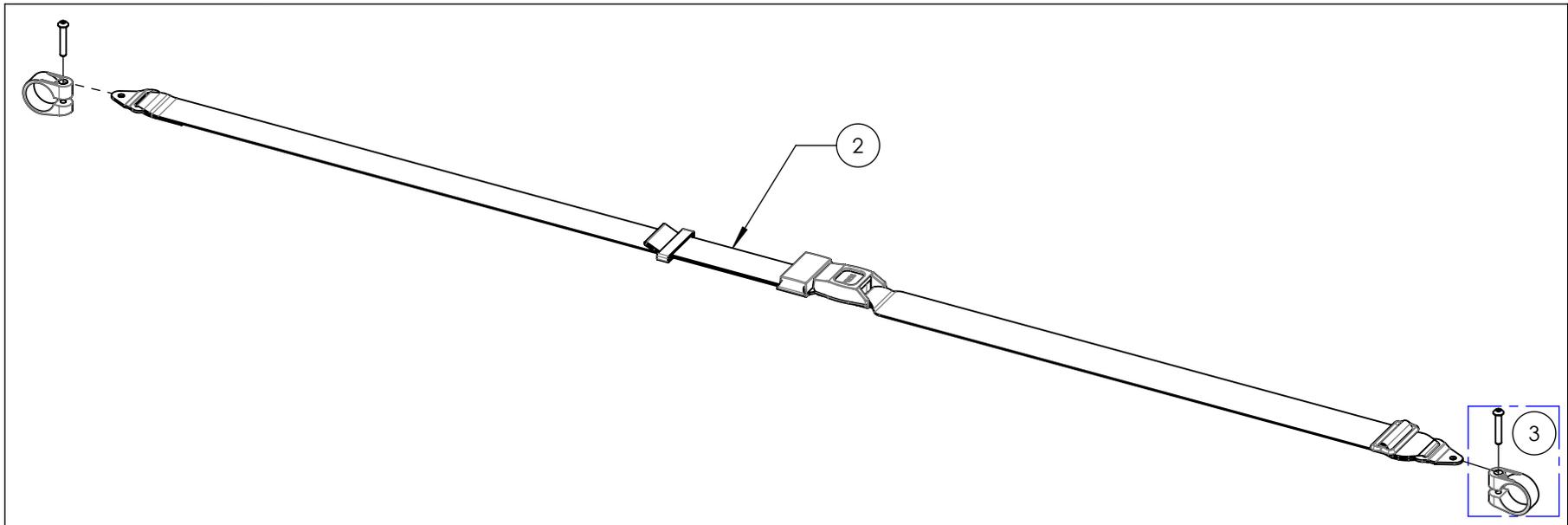

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9002220A-00
Quincaillerie - Bagues supplémentaires (2)

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0060500A-00	FRAME SAVER (SAC DE 2 / 60201)	1

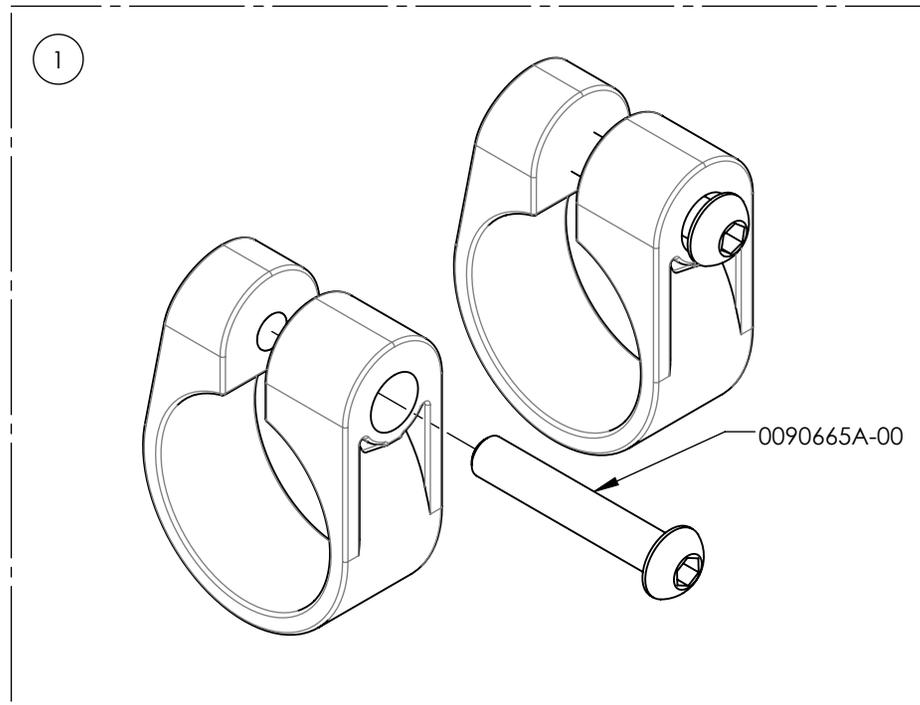

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9002221A 9002228A
CEINTURES BODYPOINT**

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9002221	9002222	9002223	9002224	9002225	9002226	9002227	9002228	REPLACEMENT PIÈCES
1	0051131A-00	CEINTURE BODYPOINT 2 PTS NON REMBOURÉE MOYEN	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	0051211A-00	CEINTURE BODYPOINT 2 PTS NON REMBOURÉE LARGE	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	0051132A-00	CEINTURE BODYPOINT 2 PTS REMBOURÉE PETIT	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	0051133A-00	CEINTURE BODYPOINT 2 PTS REMBOURÉE MOYEN	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1	0051134A-00	CEINTURE BODYPOINT 2 PTS REMBOURÉE GRAND	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1	0051212A-00	CEINTURE BODYPOINT 4 PTS REMBOURÉE PETIT	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1	0051135A-00	CEINTURE BODYPOINT 4 PTS REMBOURÉE MOYEN	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1	0051136A-00	CEINTURE BODYPOINT 4 PTS REMBOURÉE GRAND	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	0060500A-00	FRAME SAVER (SAC DE 2 / 60201)	1	1	1	1	1	2	2	2	1

9002221 A 9002222

CEINTURE - BODYPOINT, NON-REMBOURÉE 2 PTS, MOYEN
CEINTURE - BODYPOINT, NON-REMBOURÉE 2 PTS, LARGE



9002223 A 9002225

CEINTURE - BODYPOINT, REMBOURÉE 2 PTS, PETIT
CEINTURE - BODYPOINT, REMBOURÉE 2 PTS, MOYEN
CEINTURE - BODYPOINT, REMBOURÉE 2 PTS, LARGE




9002226 A 9002228

CEINTURE - BODYPOINT, REMBOURÉE 4 PTS, PETIT
CEINTURE - BODYPOINT, REMBOURÉE 4 PTS, MOYEN
CEINTURE - BODYPOINT, REMBOURÉE 4 PTS, LARGE




+

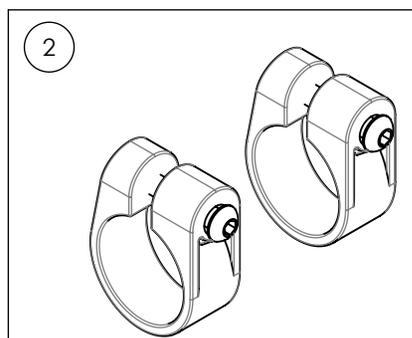

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9003093A_9003094A
WC-19 - Cadre Apex, ceinture de sécurité

NO. ITEM	NO. PIÈCE	DESCRIPTION	REMPLACEMENT PIÈCES/QTÉ
1	0051536A-00	CEINTURE WC-19 COURTE- ASSEMBLAGE	1
2	0051500A-00	CEINTURE WC-19 LONGUE - ASSEMBLAGE	1

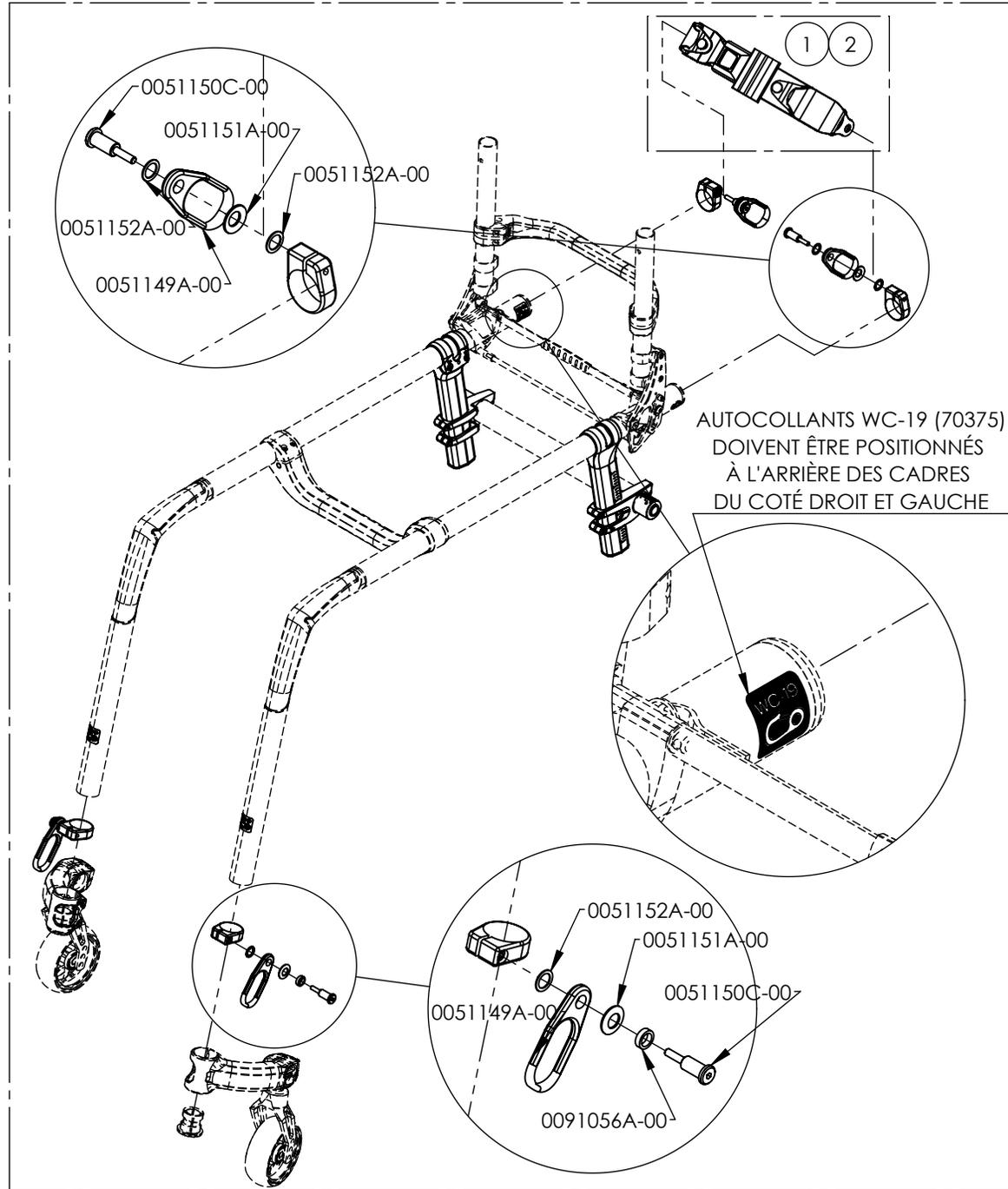

LA MISE À NIVEAU WC-19 DOIT ÊTRE SÉLECTIONNÉE AU MOMENT DE LA COMMANDE DU FAUTEUIL (DES AJUSTEMENTS SPÉCIFIQUES SONT REQUIS)

SEULE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ ET LA QUINCAILLERIE WC-19 SONT DISPONIBLES EN PIÈCES DE REMPLACEMENT

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9007790A 9007793A
CEINTURE BODYPOINT, EVOFLEX**




No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9007790A	9007791A	9007792A	9007793A
1	0051417A-00	CEINTURE BODYPOINT EVOFLEX BOUCLE REHAB M46	1	-	-	-
2	0051418A-00	CEINTURE BODYPOINT EVOFLEX BOUCLE REHAB L62	-	1	-	-
3	0051415A-00	CEINTURE BODYPOINT EVOFLEX PIVOTANTE S38	-	-	1	-
4	0051416A-00	CEINTURE BODYPOINT EVOFLEX PIVOTANTE M46	-	-	-	1
5	0051419A-00	ATTACHE BODYPOINT BAND CLAMP 32mm (PAIRE)	1	1	1	1

9007790A & 9007791A
Ceinture Bodypoint, Evoflex, boucle Rehab
moyen 46cm (18po) & grand 62cm (24po)




9007792A & 9007793A
Ceinture Bodypoint, Evoflex, pivotante
petit 38cm (15po) & moyen 46cm (18po)

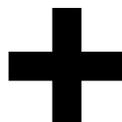

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9007808A-00
CEINTURE - TYPE AVION, 35po


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0051028A-00	CEINTURE AVION	1
2	0060500A-00	FRAME SAVER (SAC DE 2 / 60201)	1

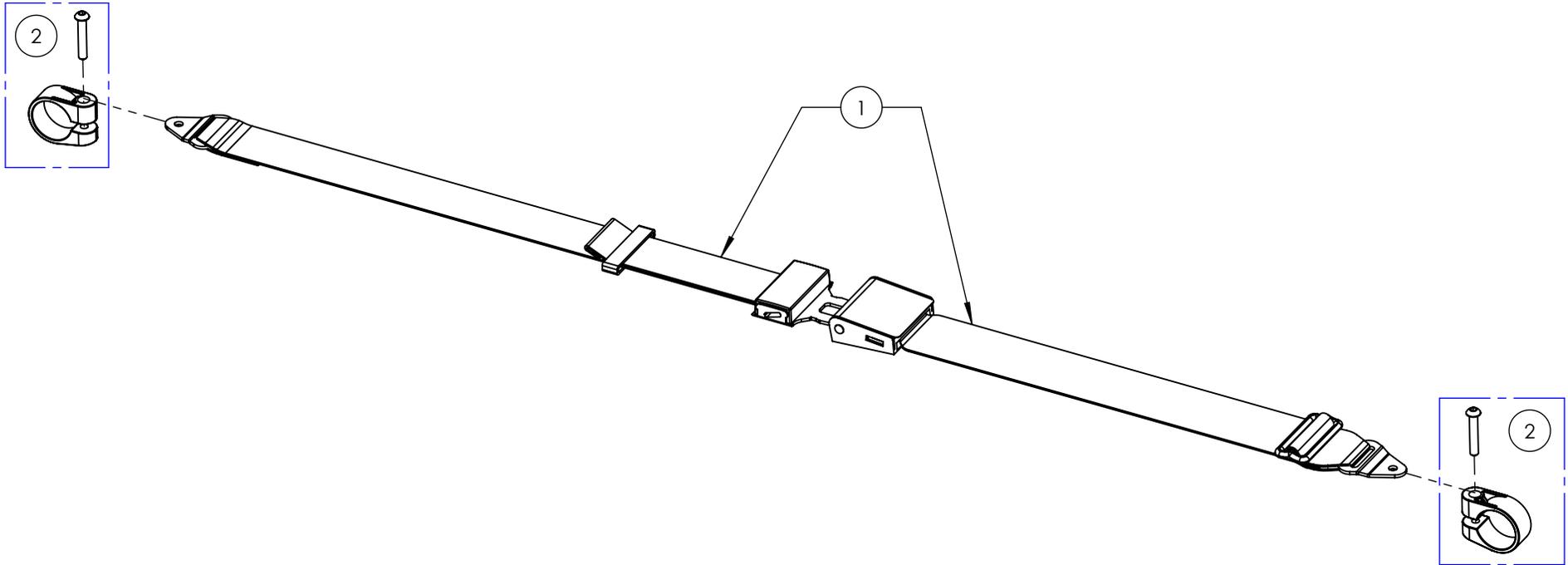

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


Catalogue de ceintures
Attaches pour ceinture de sécurité à deux points

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	9002220A-00	QUINCAILLERIE - BAGUES SUPPLÉMENTAIRES (2)	1

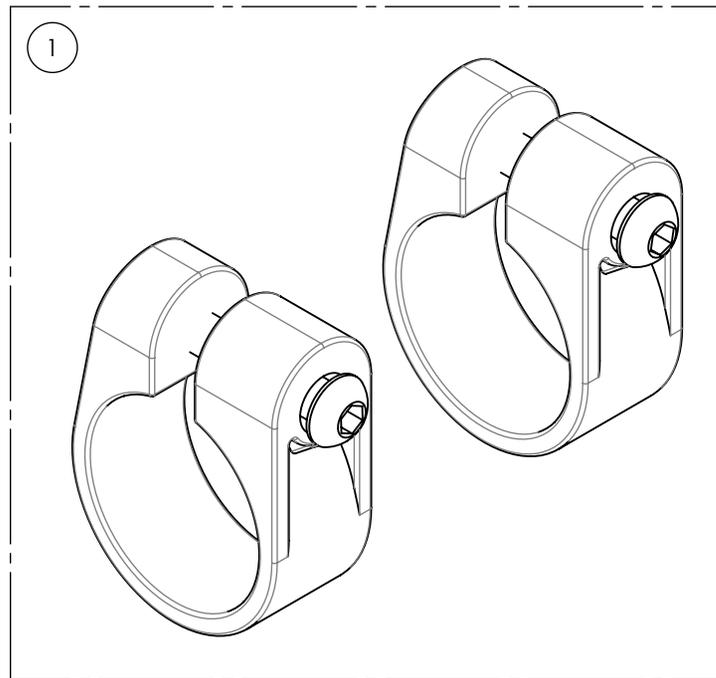


Catalogue de ceintures
Ceinture de positionnement - Bodypoint

LES ITEMS 1 À 8 INCLUS DÉJÀ LE NOMBRE
 D'ATTACHES NÉCESSAIRE

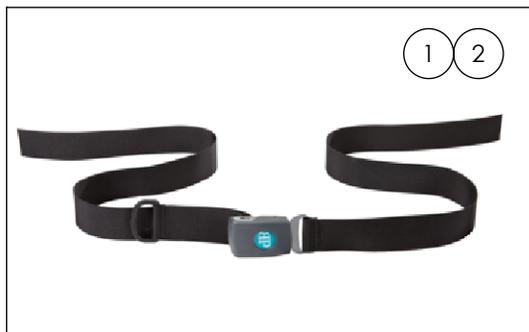


#Item	#Pièce	Description	A	B	C	D
1	9002221	Ceinture Bodypoint, non-rembourrée 2 Points, moyen	4cm (1 ½")	-	-	142cm (56")
2	9002222	Ceinture Bodypoint, non-rembourrée 2 Points, large	5cm (2")	-	-	155cm (61")
3	9002223	Ceinture Bodypoint, rembourrée 2 Points, petit	4cm (1 ½")	36cm (14")	5.5cm (2 ¼")	130cm (51")
4	9002224	Ceinture Bodypoint, rembourrée 2 Points, moyen	4cm (1 ½")	46cm (18")	5.5cm (2 ¼")	142cm (56")
5	9002225	Ceinture Bodypoint, rembourrée 2 Points, large	5cm (2")	62cm (24 ½")	7cm (2 ¾")	155cm (61")
6	9002226	Ceinture Bodypoint, rembourrée 4 Points, petit	4cm (1 ½")	36cm (14")	5.5cm (2 ¼")	130cm (51")
7	9002227	Ceinture Bodypoint, rembourrée 4 Points, moyen	4cm (1 ½")	46cm (18")	5.5cm (2 ¼")	142cm (56")
8	9002228	Ceinture Bodypoint, rembourrée 4 Points, large	5cm (2")	62cm (24 ½")	7cm (2 ¾")	155cm (61")

Ceinture non-rembourrée

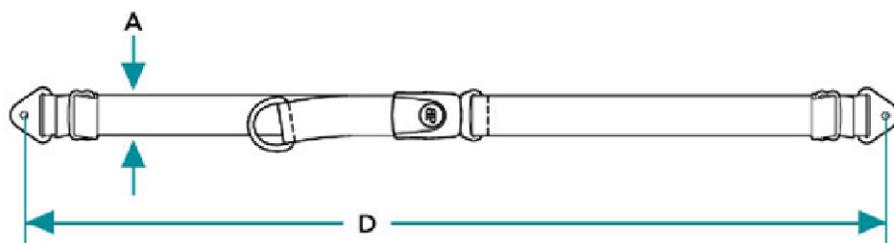

Ceinture rembourrée

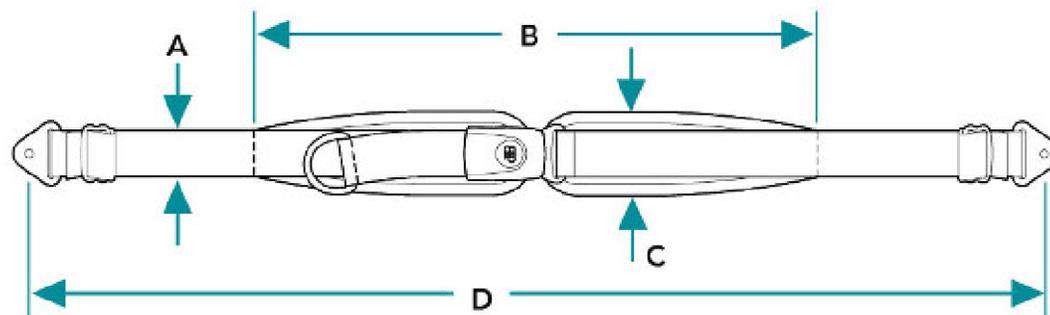


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES



TOUS LES ITEMS INCLUS DÉJÀ UNE PAIRE D'ATTACHE




#Item	#Pièce	Description	A	B	C	D
1	9007790A-00	CEINTURE - BODYPOINT, EVOFLEX, BOUCLE REHAB, MOYEN	2.5cm (1")	38cm (15")	5cm (2")	63cm (24 ¾")
2	9007791A-00	CEINTURE - BODYPOINT, EVOFLEX, BOUCLE REHAB, GRAND	4cm (1 ½")	46cm (18")	5.5cm (2 ¼")	76cm (29 ¾")
3	9007792A-00	CEINTURE - BODYPOINT, EVOFLEX, PIVOTANTE, PETIT	4cm (1 ½")	46cm (18")	5.5cm (2 ¼")	76cm (29 ¾")
4	9007793A-00	CEINTURE - BODYPOINT, EVOFLEX, PIVOTANTE, MOYEN	5cm (2")	62cm (24 ½")	7cm (2 ¾")	96cm (37 ¾")

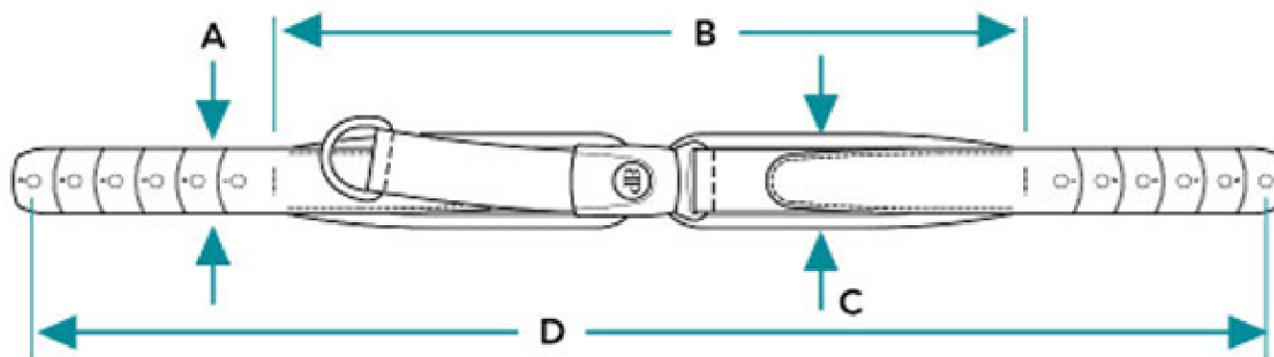

0004040A
PORTE-CANNE CR - ASSY



0004040A -				
NO. ITEM	NO. PIÈCE	DESCRIPTION	00/ QTY.	01/ QTY.
1	0002611B-00	PORTE-CANNE CR, DROITE	1	-
2	0002611B-01	PORTE-CANNE CR, GAUCHE	-	1
3	0041501A-00	BAGUE DE FREIN - ASSEMBLAGE	1	1
4	0051023A-00	COURROIE PORTE CANNE	1	1

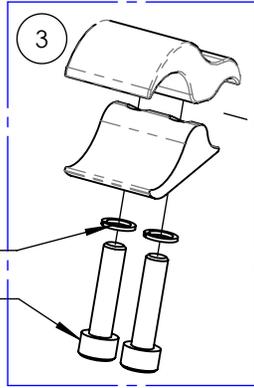


0099559A-00

0090773A-00


FIXÉ À L'ARRIÈRE DU
MONTANT DE DOSSIER

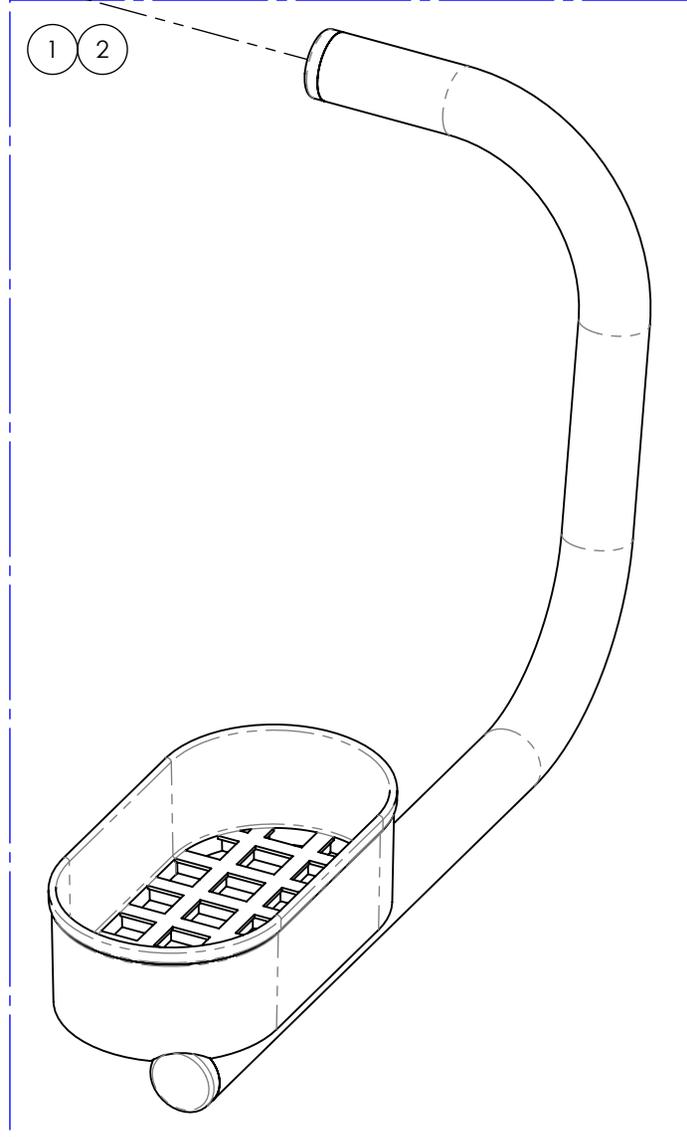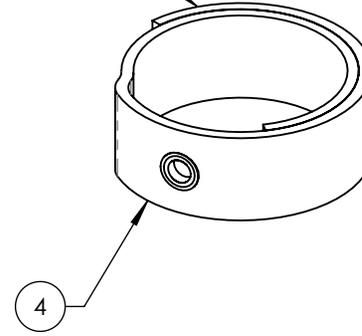

0004040A-00
PORTE-CANNE CR, DROITE - ASSY

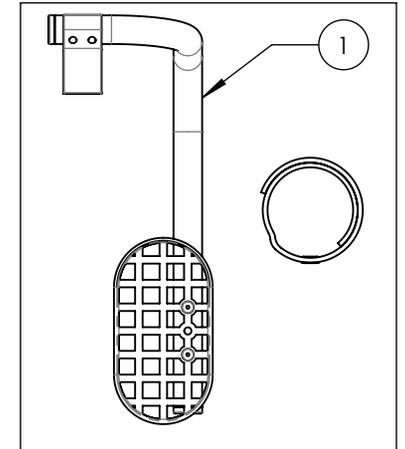

0004040A-01
PORTE-CANNE CR, GAUCHE - ASSY

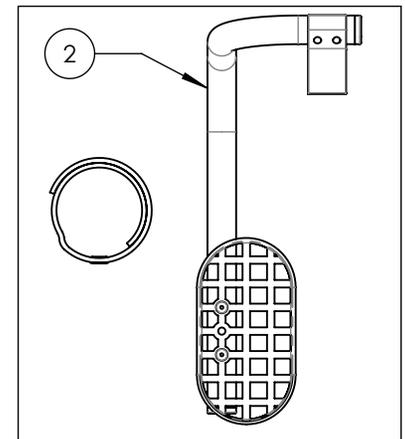


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

0007190A-00
KIT ISO 7176-19 - CADRE RIGIDE

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0002804A-00	COUVERCLE DOSSIER RABATABLE AJUST EN ANGLE, DROITE	1
2	0002804A-01	COUVERCLE DOSSIER RABATABLE AJUST EN ANGLE, GAUCHE	1
3	0007191A-00	AUTOCOLLANT AVERTISSEMENT ISO 7176-19	4
4	0007215A-00	ÉTIQUETTE ISO 7176-19	1
5	0051149A-00	TIE DOWN WC-19	4
6	0032538B-00	BAGUE SERRAGE DOSSIER ID 32mm - ASSY	4
7	0051150C-00	VIS WC-19	4
8	0051151A-00	RONDELLE BELLEVILLE WC-19	4
9	0051152A-00	RONDELLE PLASTIQUE WC-19	4
10	0091056A-00	ESPACEUR M10x14mm ODX4mm L	4

LA MISE A NIVEAU ISO7176-19 DOIT ÊTRE SÉLECTIONNÉE AU MOMENT DE LA COMMANDE DU FAUTEUIL (DES AJUSTEMENTS SPÉCIFIQUES SONT REQUIS)

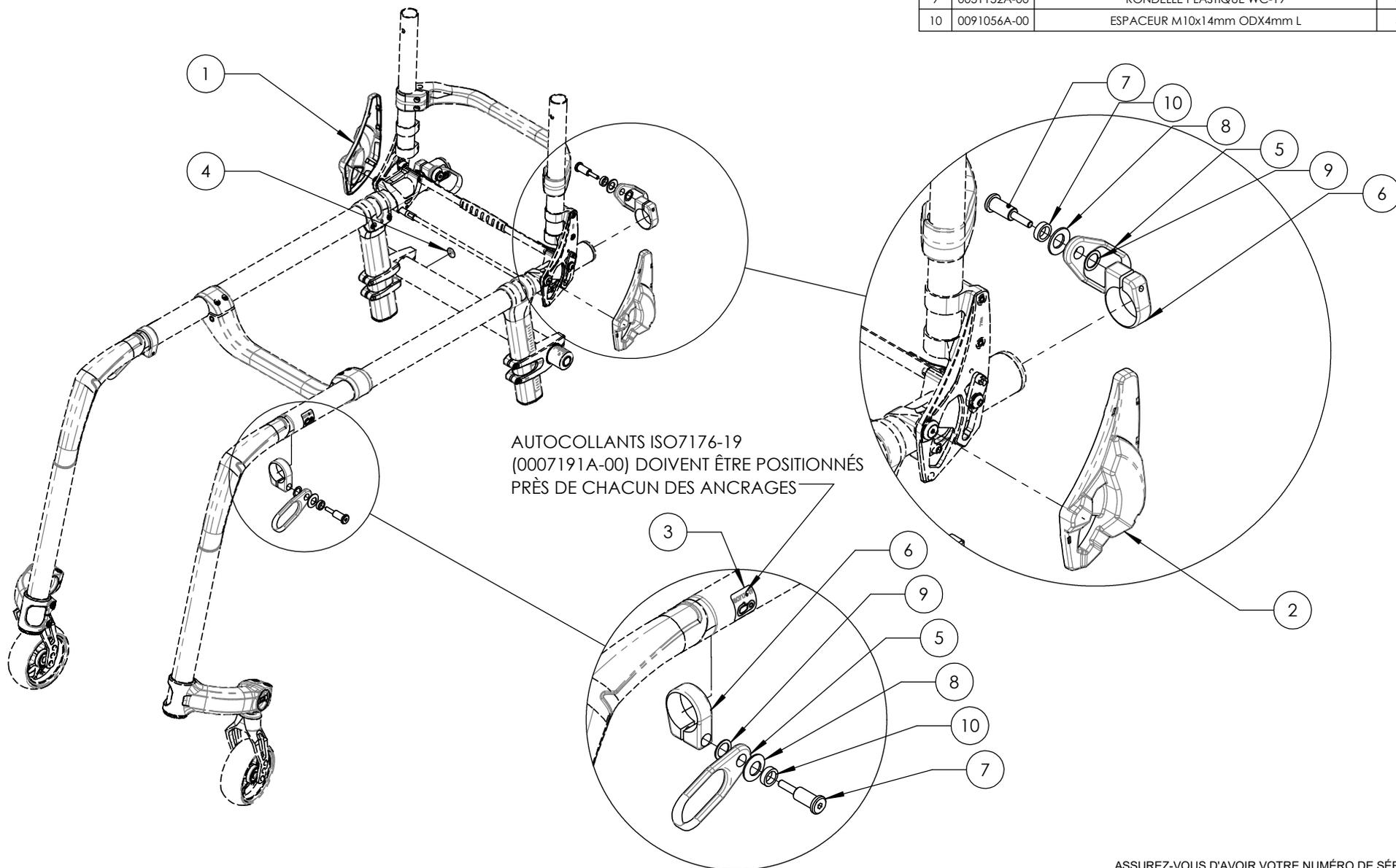


AUTOCOLLANTS ISO7176-19
 (0007191A-00) DOIVENT ÊTRE POSITIONNÉS
 PRÈS DE CHACUN DES ANCRAGES

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

0007381A-00
RUBANS REFLECTEURS


No. ITEM	No. PIECE	DESCRIPTION	QTE
1	0051328A-00	RUBAN RÉFLÉCHISSANT BLANC	4
2	0051328A-01	RUBAN RÉFLÉCHISSANT ROUGE	2

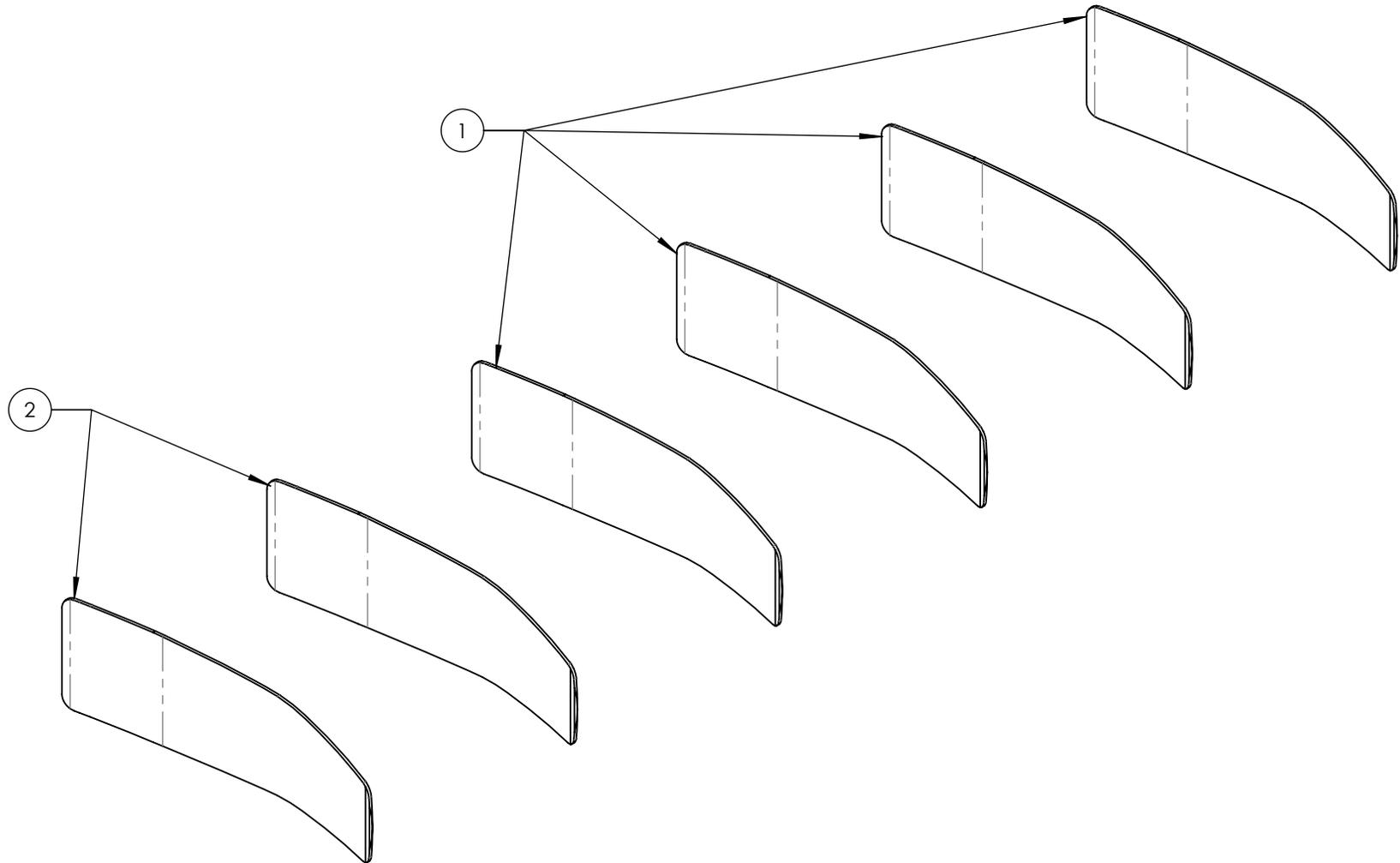




ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9003658A 9003659A
ANTI-BASCULANT PETIT & EXTENSION


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9003658	9003659
1	0051544A-00	ANTI-BASCULANT PETIT DEVANT RIGIDE - ASSEMBLAGE	1	1
2	0051517A-00	EXTENSION ANTI-BASCULANT V2 COURT	1	-
3	0051518A-00	EXTENSION ANTI-BASCULANT V2 LONG	-	1

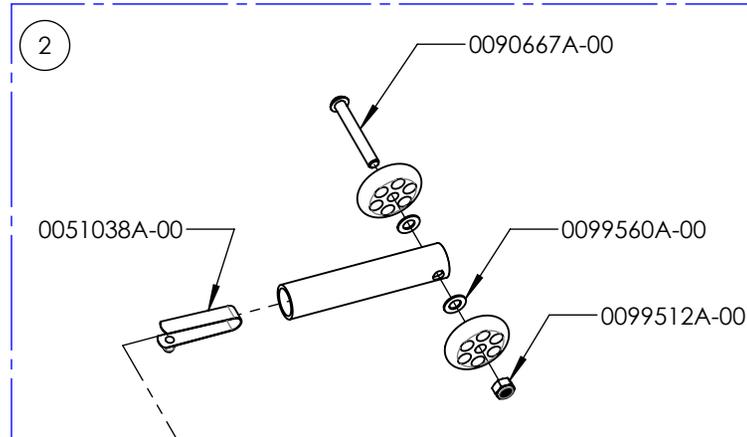

9003658A-00
 ANTI-BASCULANT - PETIT & EXT COURTE

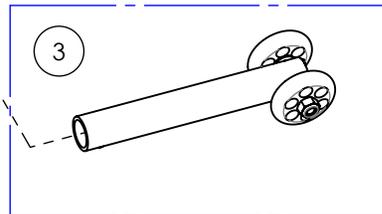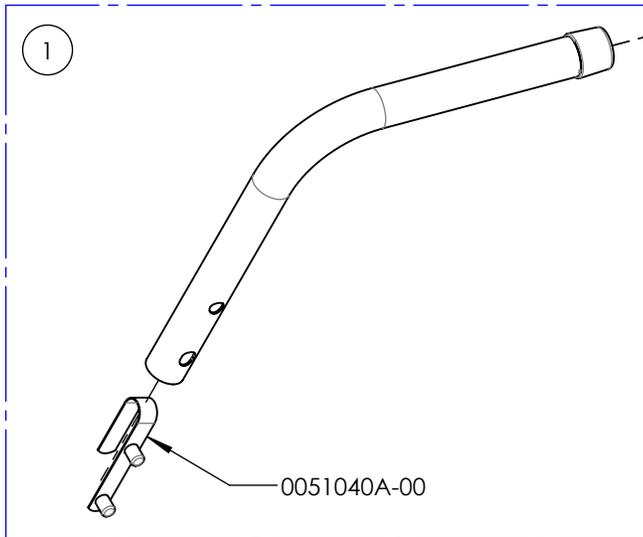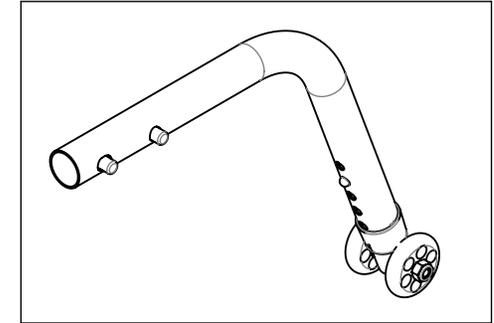


9003659A-00
 ANTI-BASCULANT - PETIT & EXT LONGUE

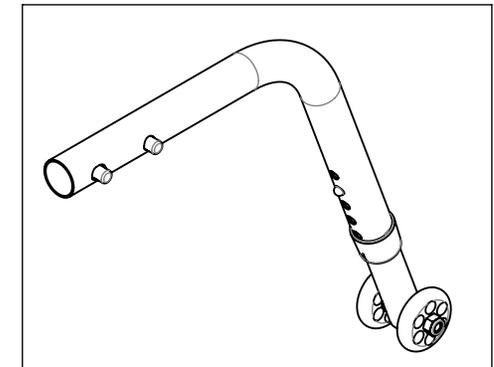




ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9003660A 9003661A
ANTI-BASCULANT GRAND & EXTENSION**


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9003660	9003661
1	0051545A-00	ANTI-BASCULANT LARGE DEVANT RIGIDE - ASSEMBLAGE	1	1
2	0051517A-00	EXTENSION ANTI-BASCULANT V2 COURT	1	-
3	0051518A-00	EXTENSION ANTI-BASCULANT V2 LONG	-	1

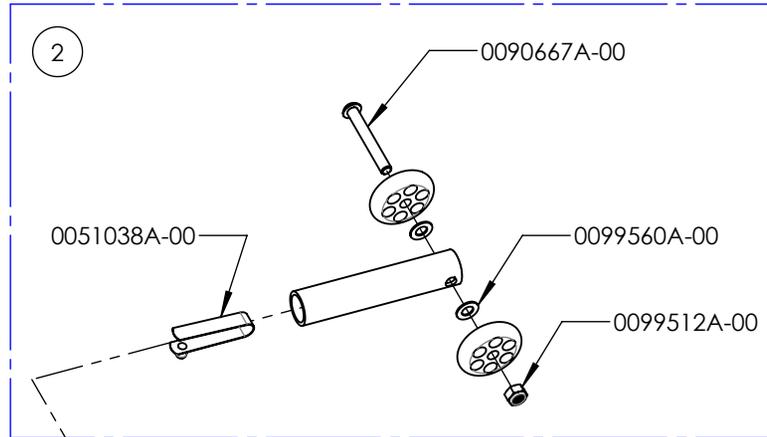

9003660A-00
ANTI-BASCULANT - GRAND & EXT COURTE

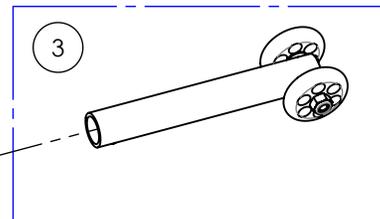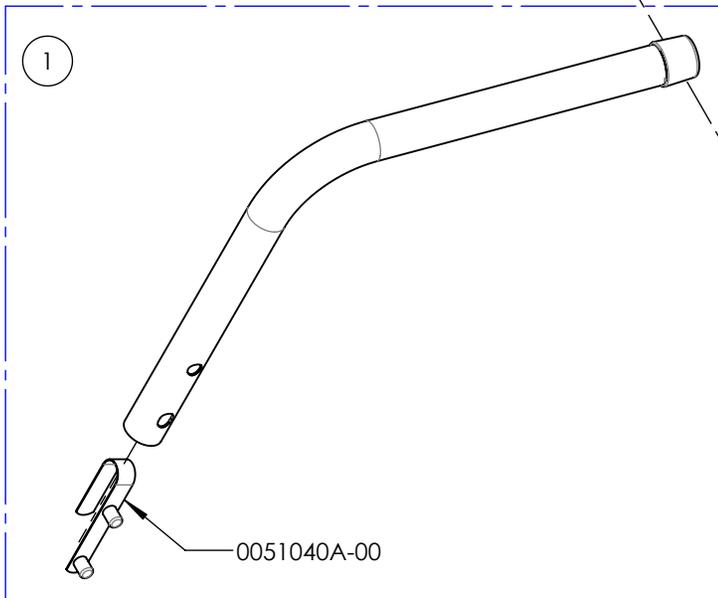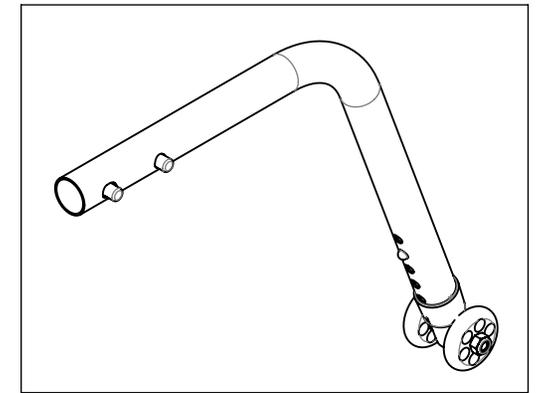



9003661A-00
ANTI-BASCULANT - GRAND & EXT LONGUE

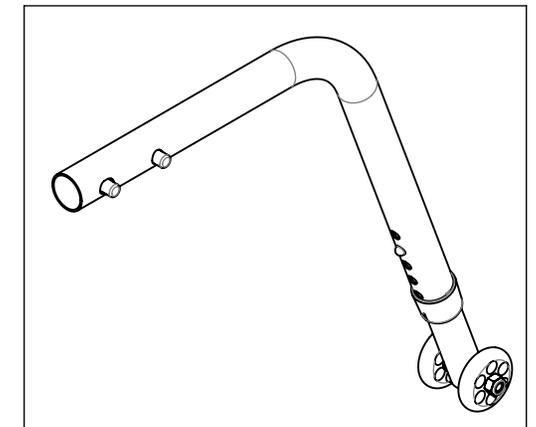

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9003662A-00
ANTI-BASCULANT - RECEPTACLE



No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0051310A-00	RÉCEPTACLE ANTI-BASCULANT DEVANT RIGIDE	1
2	0090733A-00	VIS TÊTE CYLIND M4x0.7x35mm L	1
3	0092024A-00	VIS TÊTE PROFILÉE M5x0.8x14mm L	2

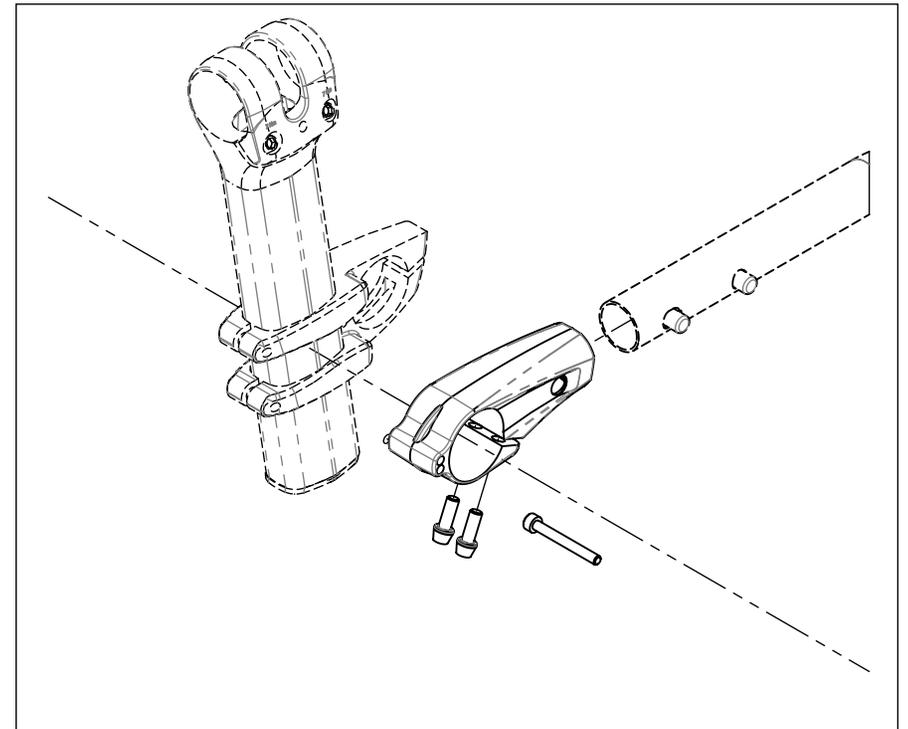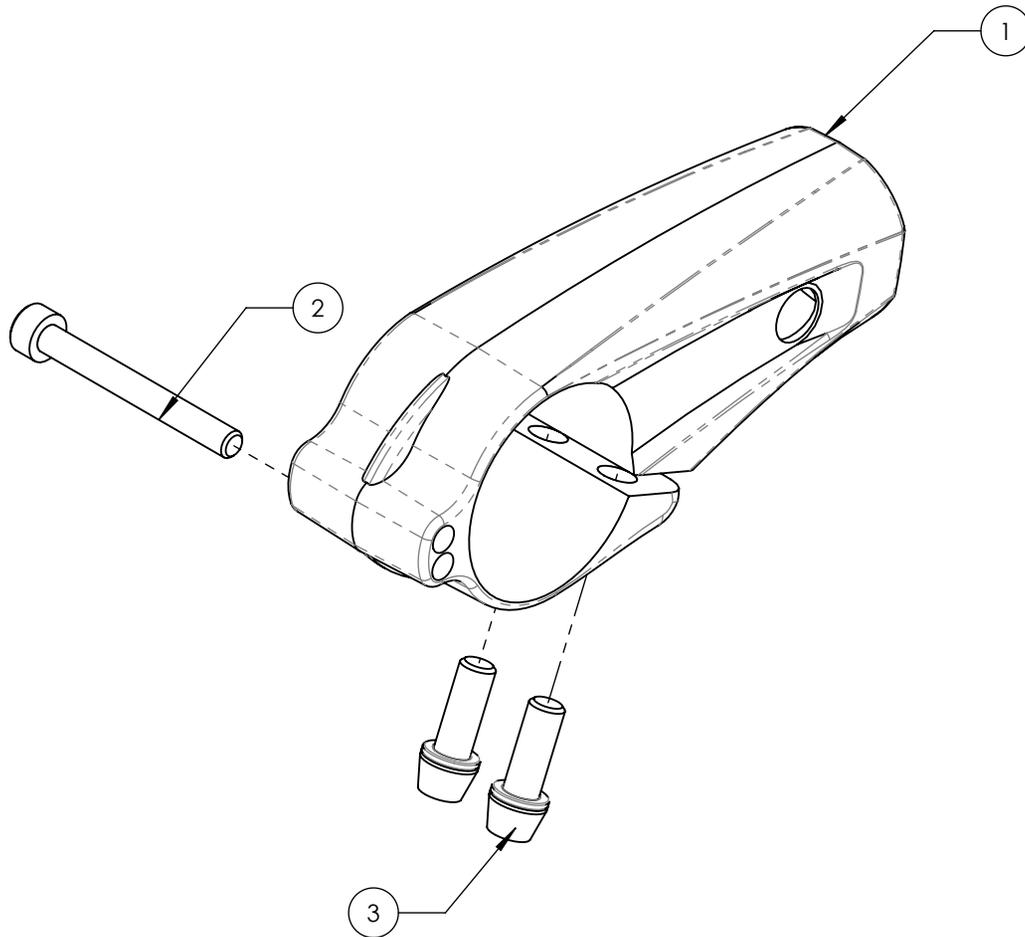


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

Catalogue d'options de couleurs
Échantillons de couleurs Apex & Veloce


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	9002496	Échantillon de couleur- Pièces plastique, Apex & Veloce	1

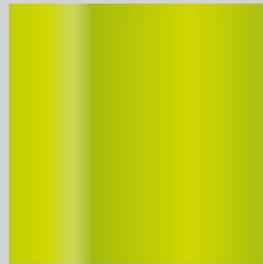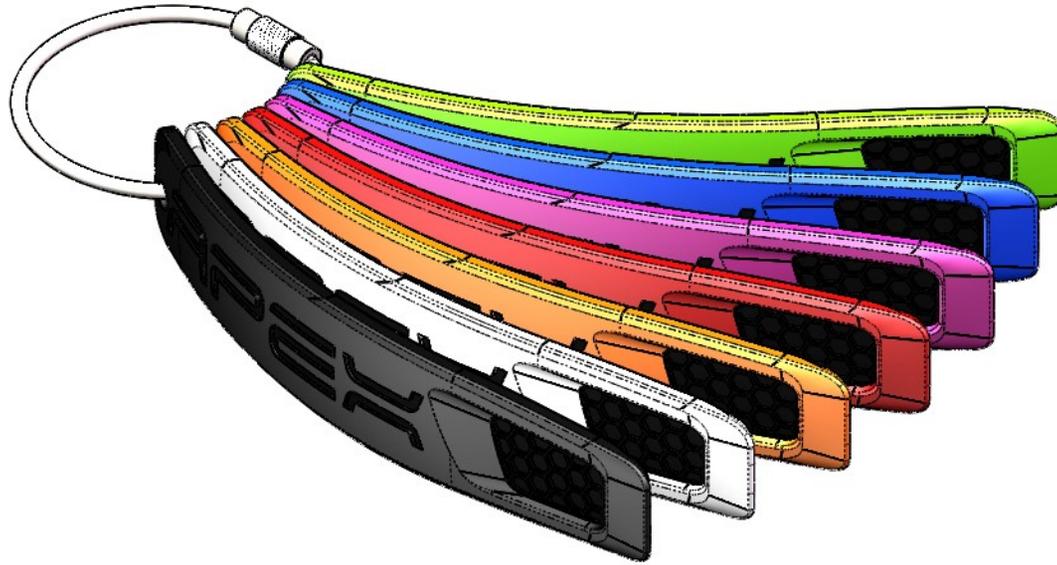

ACID GREEN
VERT ACIDE

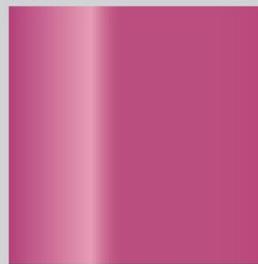


FUCHSIA

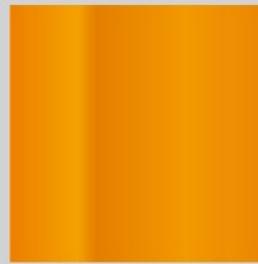


SUN-KISSED ORANGE
ORANGE TANGERINE



BLACK
NOIR

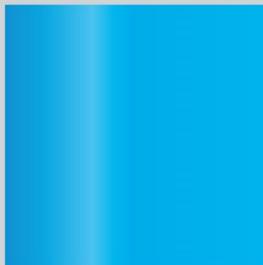

SKY BLUE
BLEU CIEL

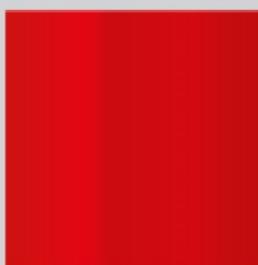

FERRARI RED
ROUGE FERRARI





WHITE
BLANC

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

Color Options Catalogue
Color Highlight - Apex Aluminum

ITEM NO.	PARTNO	DESCRIPTION	QTY
1	9003670A-00	Color Highlight - Apex Alu, Ferrari Red	1
2	9003671A-00	Color Highlight - Apex Alu, Sky Blue	1
3	9003672A-00	Color Highlight - Apex Alu, Sunkissed Orange	1
4	9003673A-00	Color Highlight - Apex Alu, Acid Green	1
5	9003674A-00	Color Highlight - Apex Alu, Fuchsia	1
6	9003675A-00	Color Highlight - Apex Alu, Black	1
7	9003676A-00	Color Highlight - Apex Alu, White	1


- 1 2 3 4 5 6 7

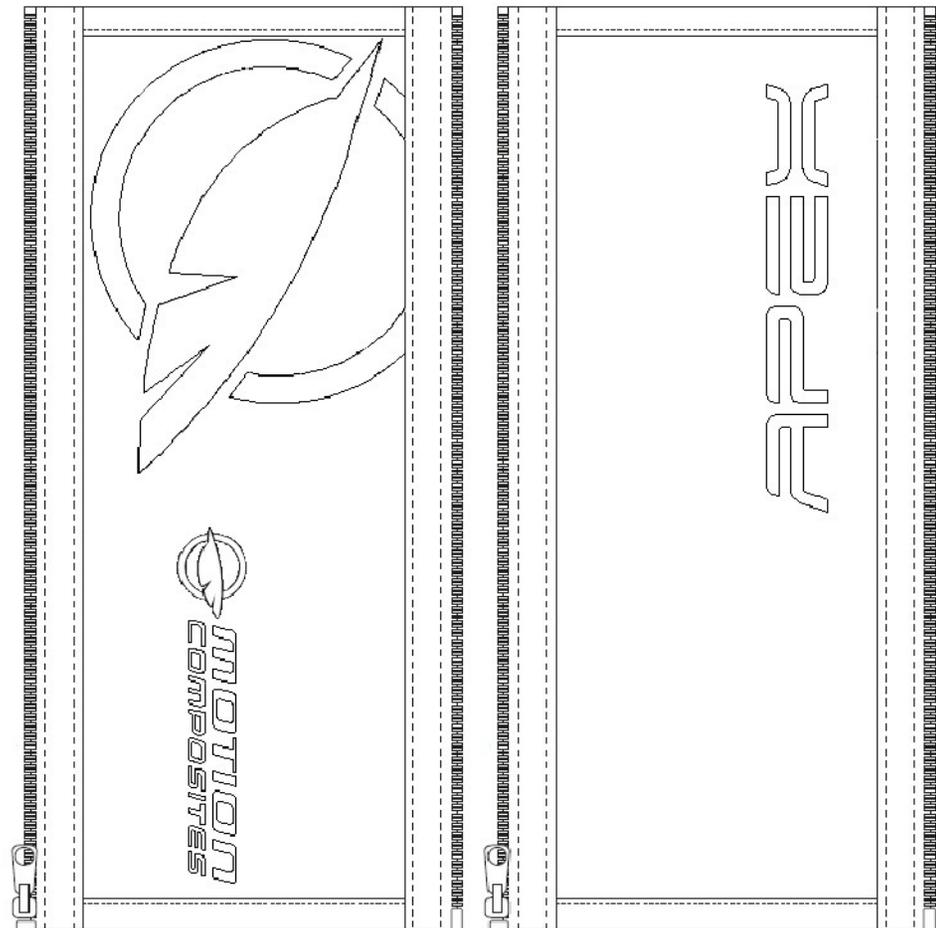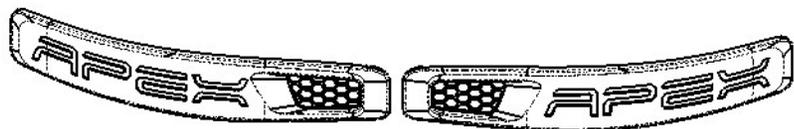

MAKE SURE TO HAVE YOUR SERIAL NUMBER
 NEARBY WHEN ORDERING PARTS FOR YOUR
 MOTION COMPOSITES WHEELCHAIR

Catalogue d'accessoires
Anti-basculants & réceptacle

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	9003662A-00	ANTI-BASCULANT - RECEPTACLE	2
2	9003658A-00	ANTI-BASCULANT - PETIT & EXT COURTE	2
3	9003659A-00	ANTI-BASCULANT - PETIT & EXT LONGUE	2
4	9003660A-00	ANTI-BASCULANT - GRAND & EXT COURTE	2
5	9003661A-00	ANTI-BASCULANT - GRAND & EXT LONGUE	2

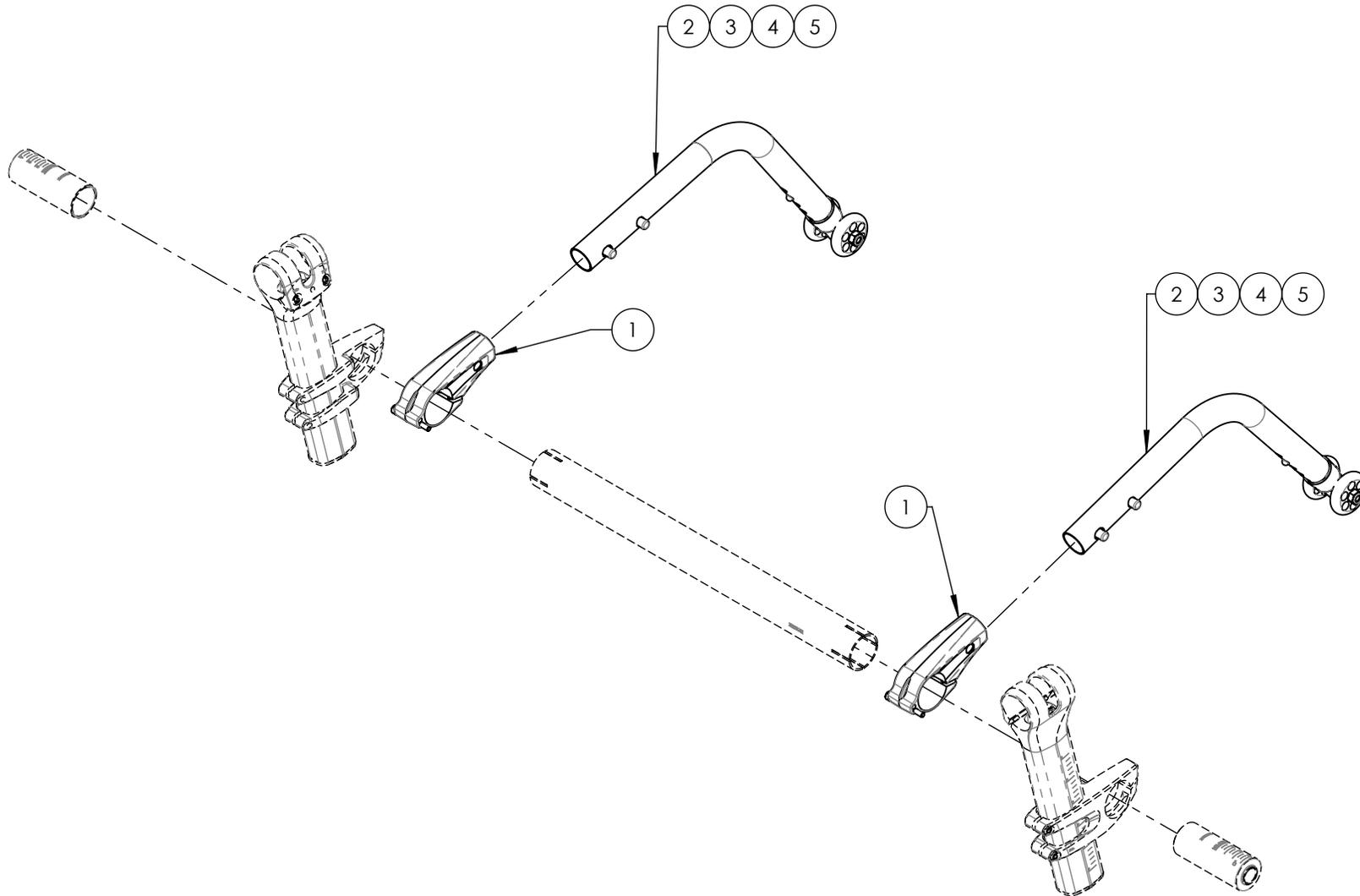

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

Catalogue d'accessoires
Sac à dos Newton

NO. ITEM	NO. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	9003059A-00	SAC À DOS - NEWTON	1



20"
51cm

13"
33cm



ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

Catalogue d'accessoires
Sac Bodypoint Mobility

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	9007794A-00	SAC - BODYPOINT MOBILITY	1

1



ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

Catalogue d'accessoires
Pochette multi-usages désinfectante Newton

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0006051A-00	POCHETTE MULTI-USAGES DÉSINFECTANTE NEWTON	1

1



ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

Catalogue d'accessoires
Polo Motion Composites



No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	9003049A-00	POLO - MOTION COMPOSITES, HOMME, PETIT	1
2	9003050A-00	POLO - MOTION COMPOSITES, HOMME, MOYEN	1
3	9003051A-00	POLO - MOTION COMPOSITES, HOMME, LARGE	1
4	9003052A-00	POLO - MOTION COMPOSITES, HOMME, X-LARGE	1
5	9003053A-00	POLO - MOTION COMPOSITES, HOMME, 2X-LARGE	1
6	9003054A-00	POLO - MOTION COMPOSITES, HOMME, 3X-LARGE	1
7	9003055A-00	POLO - MOTION COMPOSITES, HOMME, 4X-LARGE	1
8	9003056A-00	POLO - MOTION COMPOSITES, FEMME, PETIT	1
9	9003057A-00	POLO - MOTION COMPOSITES, FEMME, MOYEN	1
10	9003058A-00	POLO - MOTION COMPOSITES, FEMME, LARGE	1

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

Catalogue d'accessoires
Pochette de siège

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	9001634A-00	POCHETTE DE SIÈGE - MOTION COMPOSITES	1



ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9001643A-00
ENSEMBLE D'OUTILS

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0051120A-00	ENSEMBLE OUTIL METRIQUE	1
2	0080001A-00	OUTIL FILLETÉ	1



ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


Catalogue d'accessoires
Ensemble d'outils

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	9001643A-00	ENSEMBLE D'OUTILS	1
2	0051117A-00	TOURNEVIS DE PRECISION HEX 1.5mm	1





ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9003670A_9003676A
ACCENT DE COULEUR - APEX ALUMINIUM

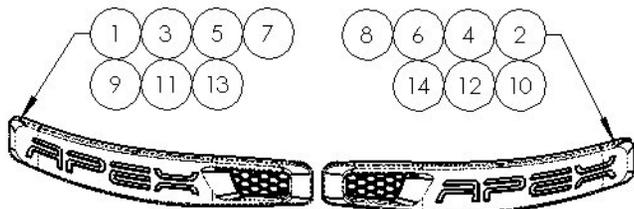

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	9003670	9003671	9003672	9003673	9003674	9003675	9003676
1	0051553A-00	GARDE POTENCE APEX ROUGE FERRARI, DROITE - ASSY	1	-	-	-	-	-	-
2	0051560A-00	GARDE POTENCE APEX ROUGE FERRARI, GAUCHE - ASSY	1	-	-	-	-	-	-
3	0051554A-00	GARDE POTENCE APEX BLEU CIEL, DROITE - ASSY	-	1	-	-	-	-	-
4	0051561A-00	GARDE POTENCE APEX BLEU CIEL, GAUCHE - ASSY	-	1	-	-	-	-	-
5	0051555A-00	GARDE POTENCE APEX ORANGE TANGERINE, DROITE - ASSY	-	-	1	-	-	-	-
6	0051562A-00	GARDE POTENCE APEX ORANGE TANGERINE, GAUCHE - ASSY	-	-	1	-	-	-	-
7	0051556A-00	GARDE POTENCE APEX VERT ACIDE, DROITE - ASSY	-	-	-	1	-	-	-
8	0051563A-00	GARDE POTENCE APEX VERT ACIDE, GAUCHE - ASSY	-	-	-	1	-	-	-
9	0051557A-00	GARDE POTENCE APEX FUCHSIA, DROITE - ASSY	-	-	-	-	1	-	-
10	0051564A-00	GARDE POTENCE APEX FUCHSIA, GAUCHE - ASSY	-	-	-	-	1	-	-
11	0051558A-00	GARDE POTENCE APEX NOIR, DROITE - ASSY	-	-	-	-	-	1	-
12	0051565A-00	GARDE POTENCE APEX NOIR, GAUCHE - ASSY	-	-	-	-	-	1	-
13	0051559A-00	GARDE POTENCE APEX BLANC, DROITE - ASSY	-	-	-	-	-	-	1
14	0051566A-00	GARDE POTENCE APEX BLANC, GAUCHE - ASSY	-	-	-	-	-	-	1
15	0051249A-00	GARDE CADRE NÉOPREN APEX ROUGE FERRARI (PAIRE)	1	-	-	-	-	-	-
16	0051250A-00	GARDE CADRE NÉOPREN APEX BLEU CIEL (PAIRE)	-	1	-	-	-	-	-
17	0051251A-00	GARDE CADRE NÉOPREN APEX ORANGE TANGERINE (PAIRE)	-	-	1	-	-	-	-
18	0051252A-00	GARDE CADRE NÉOPREN APEX VERT ACIDE (PAIRE)	-	-	-	1	-	-	-
19	0051253A-00	GARDE CADRE NÉOPREN APEX FUCHSIA (PAIRE)	-	-	-	-	1	-	-
20	0051254A-00	GARDE CADRE NÉOPREN APEX ANTHRACITE (PAIRE)	-	-	-	-	-	1	-
21	0051255A-00	GARDE CADRE NÉOPREN APEX BLANC (PAIRE)	-	-	-	-	-	-	1



15 16 17 18 19 20 21

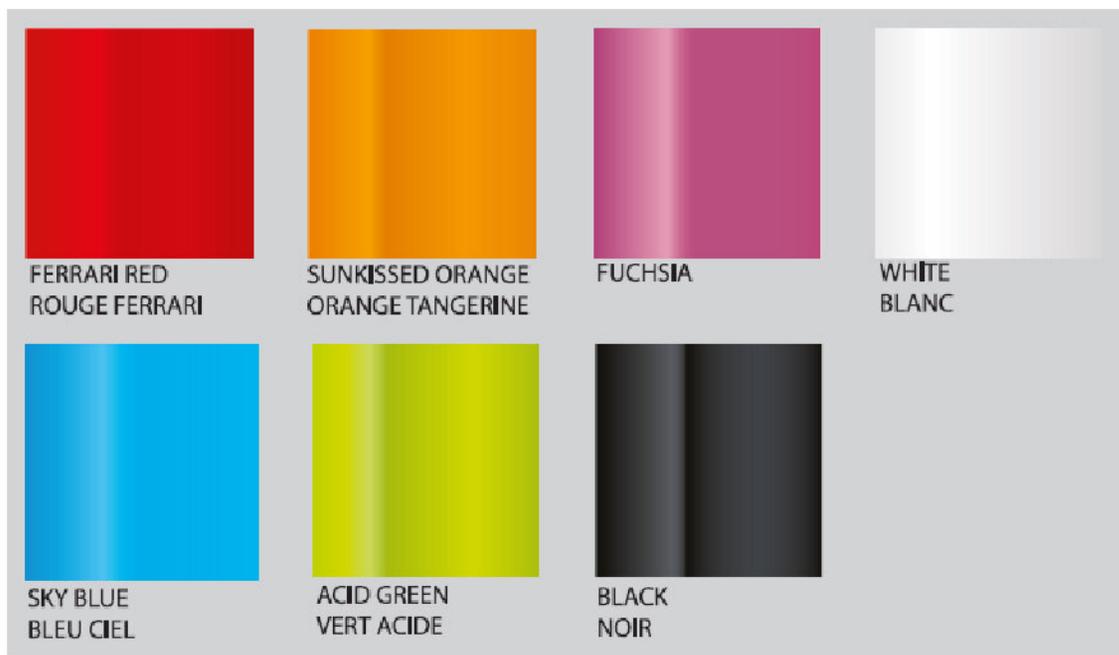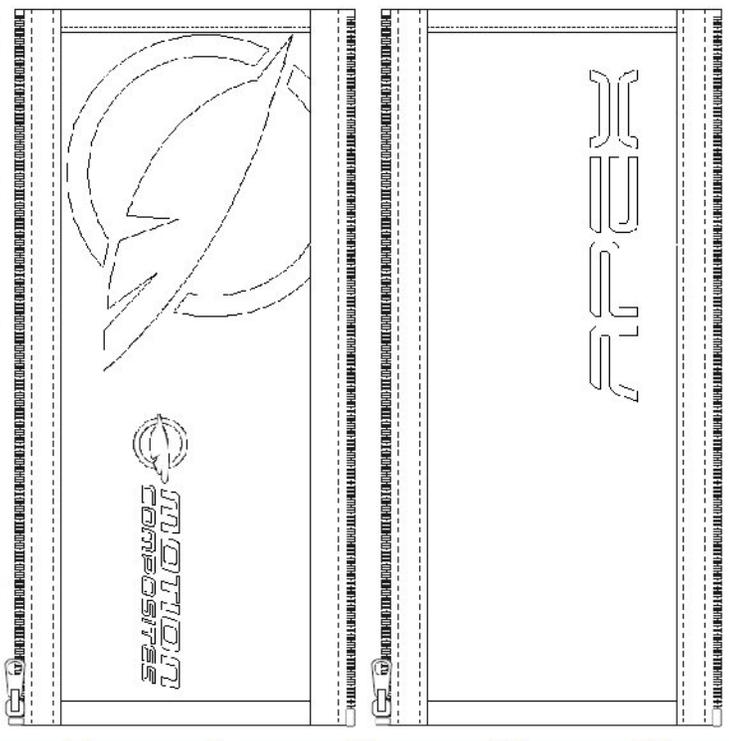

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

Catalogue d'options de couleurs
Accent de couleur - Apex aluminium


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	9003670A-00	ACCENT DE COULEUR - APEX ALU, ROUGE FERRARI	1
2	9003671A-00	ACCENT DE COULEUR - APEX ALU, BLEU CIEL	1
3	9003672A-00	ACCENT DE COULEUR - APEX ALU, ORANGE TANGERINE	1
4	9003673A-00	ACCENT DE COULEUR - APEX ALU, VERT ACIDE	1
5	9003674A-00	ACCENT DE COULEUR - APEX ALU, FUCHSIA	1
6	9003675A-00	ACCENT DE COULEUR - APEX ALU, NOIR	1
7	9003676A-00	ACCENT DE COULEUR - APEX ALU, BLANC	1

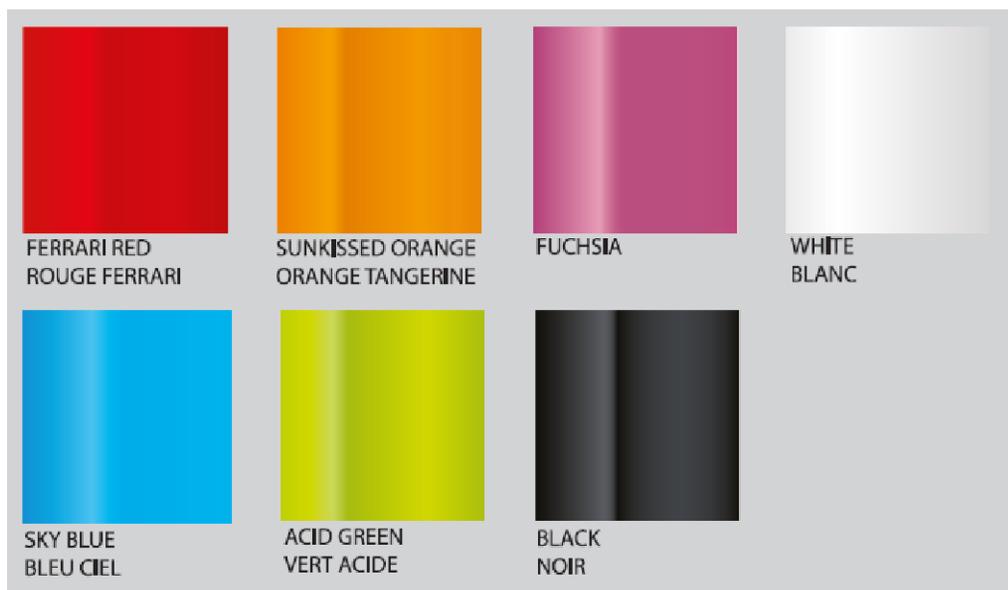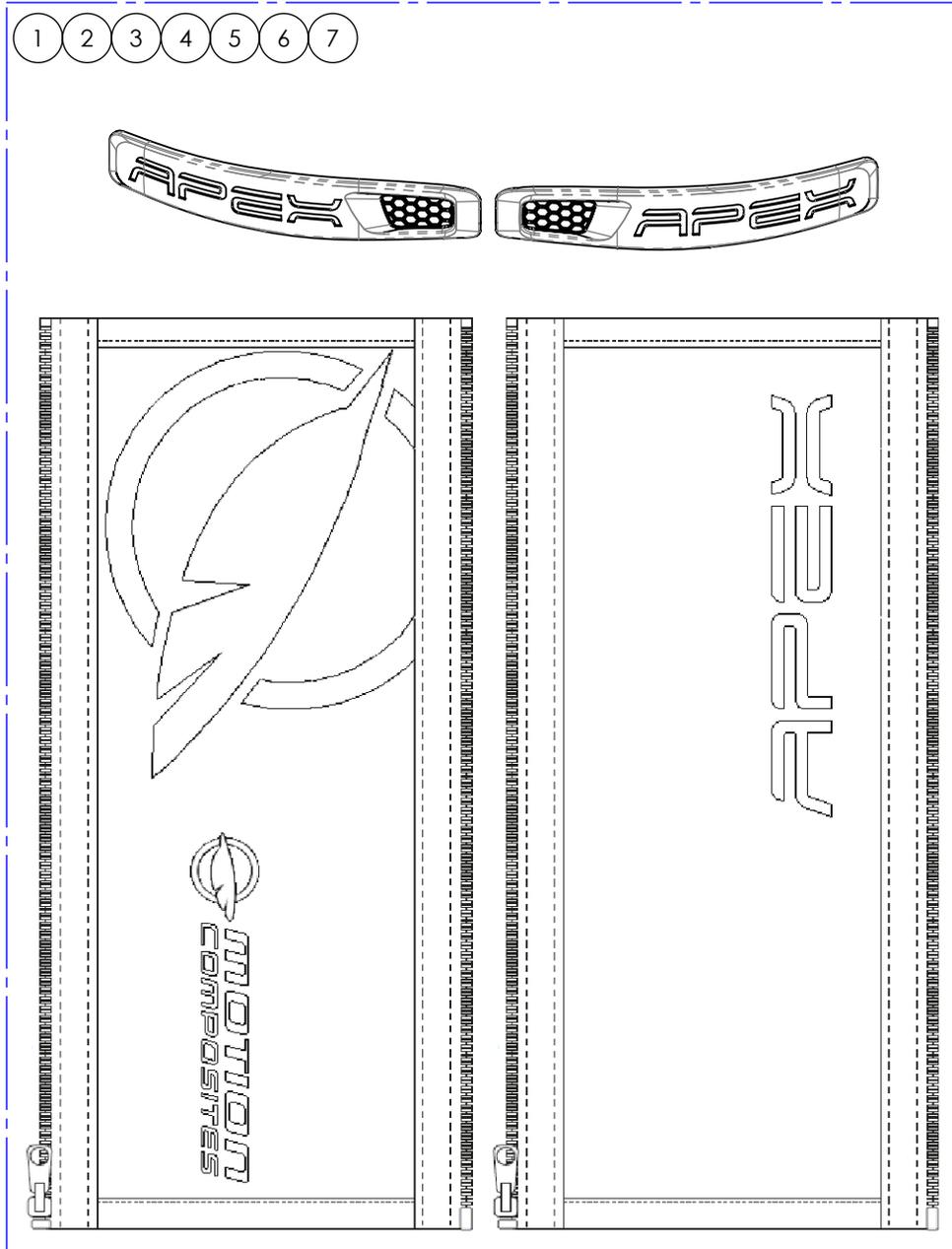


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

Catalogue d'options de couleurs
Échantillons de couleurs Apex & Veloce


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0051588A-00	ÉCHANTILLON COULEUR APEX PORTE CLÉ - ASSEMBLAGE	1

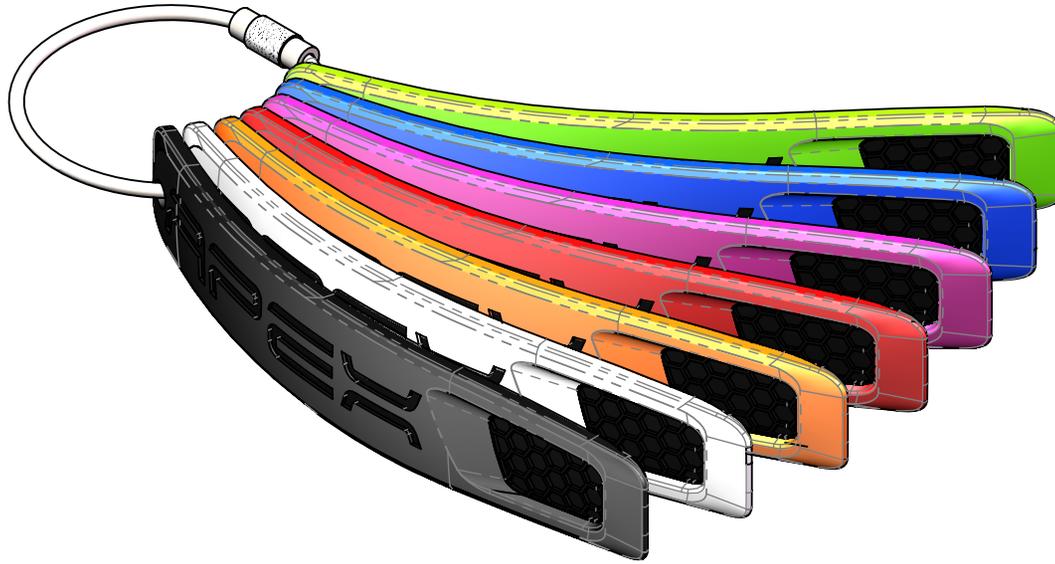

ACID GREEN
VERT ACIDE

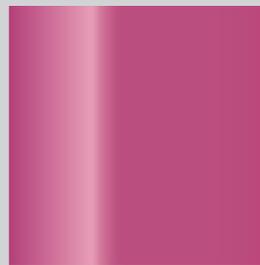


FUCHSIA

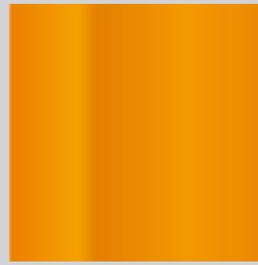

SUNKISSED ORANGE
ORANGE TANGERINE




BLACK
NOIR

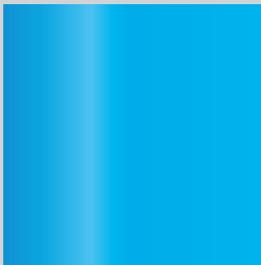

SKY BLUE
BLEU CIEL



FERRARI RED
ROUGE FERRARI

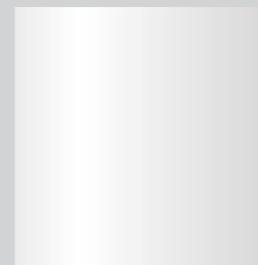

WHITE
BLANC

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES