




# CATALOGUE DE PIÈCES

## *HELIO A6*



**Catalogue cadre**  
**Assemblage cadre Helio A6**


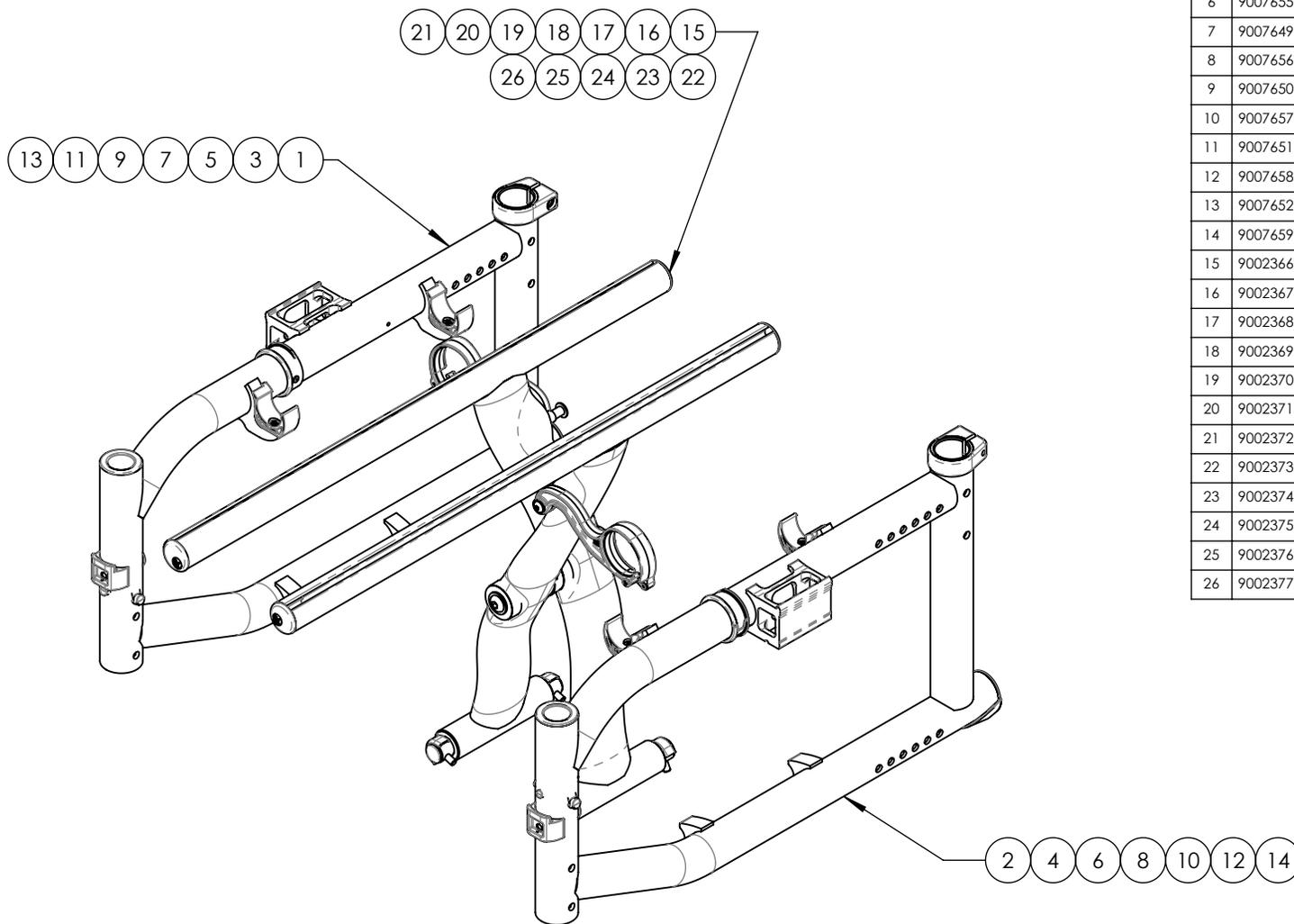


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                           | QTÉ |
|----------|-------------|---------------------------------------|-----|
| 1        | 9007646B-00 | CADRE - T5S ALU, DROITE, 14po (NOIR)  | 1   |
| 2        | 9007653B-00 | CADRE - T5S ALU, GAUCHE, 14po (NOIR)  | 1   |
| 3        | 9007647B-00 | CADRE - T5S ALU, DROITE, 15po (NOIR)  | 1   |
| 4        | 9007654B-00 | CADRE - T5S ALU, GAUCHE, 15po (NOIR)  | 1   |
| 5        | 9007648B-00 | CADRE - T5S ALU, DROITE, 16po (NOIR)  | 1   |
| 6        | 9007655B-00 | CADRE - T5S ALU, GAUCHE, 16po (NOIR)  | 1   |
| 7        | 9007649B-00 | CADRE - T5S ALU, DROITE, 17po (NOIR)  | 1   |
| 8        | 9007656B-00 | CADRE - T5S ALU, GAUCHE, 17po (NOIR)  | 1   |
| 9        | 9007650B-00 | CADRE - T5S ALU, DROITE, 18po (NOIR)  | 1   |
| 10       | 9007657B-00 | CADRE - T5S ALU, GAUCHE, 18po (NOIR)  | 1   |
| 11       | 9007651B-00 | CADRE - T5S ALU, DROITE, 19po (NOIR)  | 1   |
| 12       | 9007658B-00 | CADRE - T5S ALU, GAUCHE, 19po (NOIR)  | 1   |
| 13       | 9007652B-00 | CADRE - T5S ALU, DROITE, 20po (NOIR)  | 1   |
| 14       | 9007659B-00 | CADRE - T5S ALU, GAUCHE, 20po (NOIR)  | 1   |
| 15       | 9002366B-00 | CROISILLON - ALU HYDRO, LARG. 14po    | 1   |
| 16       | 9002367B-00 | CROISILLON - ALU HYDRO, LARG. 15po    | 1   |
| 17       | 9002368B-00 | CROISILLON - ALU HYDRO, LARG. 16po    | 1   |
| 18       | 9002369B-00 | CROISILLON - ALU HYDRO, LARG. 17po    | 1   |
| 19       | 9002370B-00 | CROISILLON - ALU HYDRO, LARG. 18po    | 1   |
| 20       | 9002371B-00 | CROISILLON - ALU HYDRO, LARG. 19po    | 1   |
| 21       | 9002372B-00 | CROISILLON - ALU HYDRO, LARG. 20po    | 1   |
| 22       | 9002373B-00 | CROISILLON HD - ALU HYDRO, LARG. 18po | 1   |
| 23       | 9002374B-00 | CROISILLON HD - ALU HYDRO, LARG. 19po | 1   |
| 24       | 9002375B-00 | CROISILLON HD - ALU HYDRO, LARG. 20po | 1   |
| 25       | 9002376B-00 | CROISILLON HD - ALU HYDRO, LARG. 21po | 1   |
| 26       | 9002377B-00 | CROISILLON HD - ALU HYDRO, LARG. 22po | 1   |

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9002366B\_9002372B**  
**CROISILLON - ALUMINIUM, HYDROFORMÉ, TYPE 2**  
**(SPÉCIFIER PROFONDEUR ASSISE)**



| ITEM NO. | PARTNO      | DESCRIPTION                      | 9002366 | 9002367 | 9002368 | 9002369 | 9002370 | 9002371 | 9002372 |
|----------|-------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1        | 9010284B-00 | X-BRACE - ALU, HYDRO, 14in WIDTH | 1       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 2        | 9010285B-00 | X-BRACE - ALU, HYDRO, 15in WIDTH | -       | 1       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 3        | 9010286B-00 | X-BRACE - ALU, HYDRO, 16in WIDTH | -       | -       | 1       | -       | -       | -       | -       |
| 4        | 9010287B-00 | X-BRACE - ALU, HYDRO, 17in WIDTH | -       | -       | -       | 1       | -       | -       | -       |
| 5        | 9010288B-00 | X-BRACE - ALU, HYDRO, 18in WIDTH | -       | -       | -       | -       | 1       | -       | -       |
| 6        | 9010289B-00 | X-BRACE - ALU, HYDRO, 19in WIDTH | -       | -       | -       | -       | -       | 1       | -       |
| 7        | 9010290B-00 | X-BRACE - ALU, HYDRO, 20in WIDTH | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1       |
| 8        | 9010315A-00 | PLUG - ALU SEAT TUBE             | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |

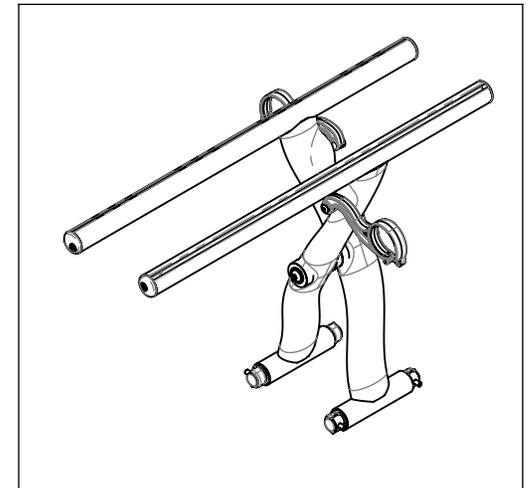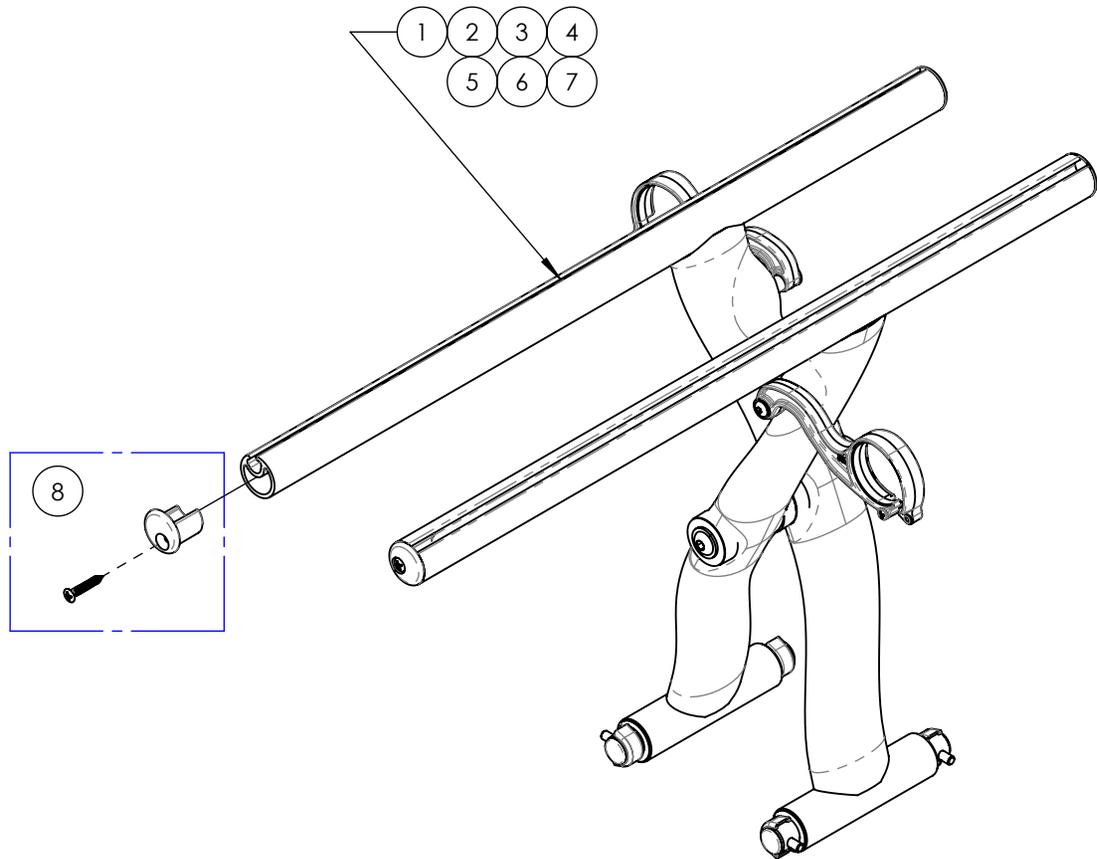

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


**9002373B\_9002377B**  
**CROISILLON HD - ALUMINIUM, HYDROFORMÉ, TYPE 2**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                              | 9002373 | 9002374 | 9002375 | 9002376 | 9002377 |
|----------|-------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1        | 9010291B-00 | CROISILLON HD - ALU, HYDRO, LARGEUR 18po | 1       | -       | -       | -       | -       |
| 2        | 9010292B-00 | CROISILLON HD - ALU, HYDRO, LARGEUR 19po | -       | 1       | -       | -       | -       |
| 3        | 9010293B-00 | CROISILLON HD - ALU, HYDRO, LARGEUR 20po | -       | -       | 1       | -       | -       |
| 4        | 9010294B-00 | CROISILLON HD - ALU, HYDRO, LARGEUR 21po | -       | -       | -       | 1       | -       |
| 5        | 9010295B-00 | CROISILLON HD - ALU, HYDRO, LARGEUR 22po | -       | -       | -       | -       | 1       |
| 6        | 9010315A-00 | BOUCHON - TUBE DE SIÈGE ALU              | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |

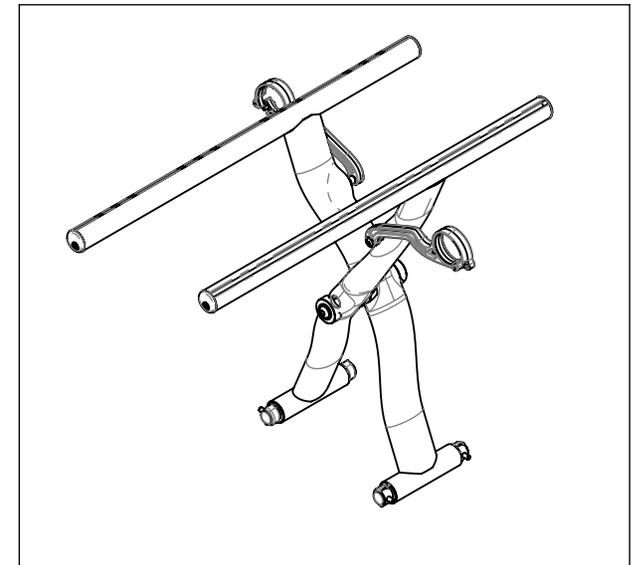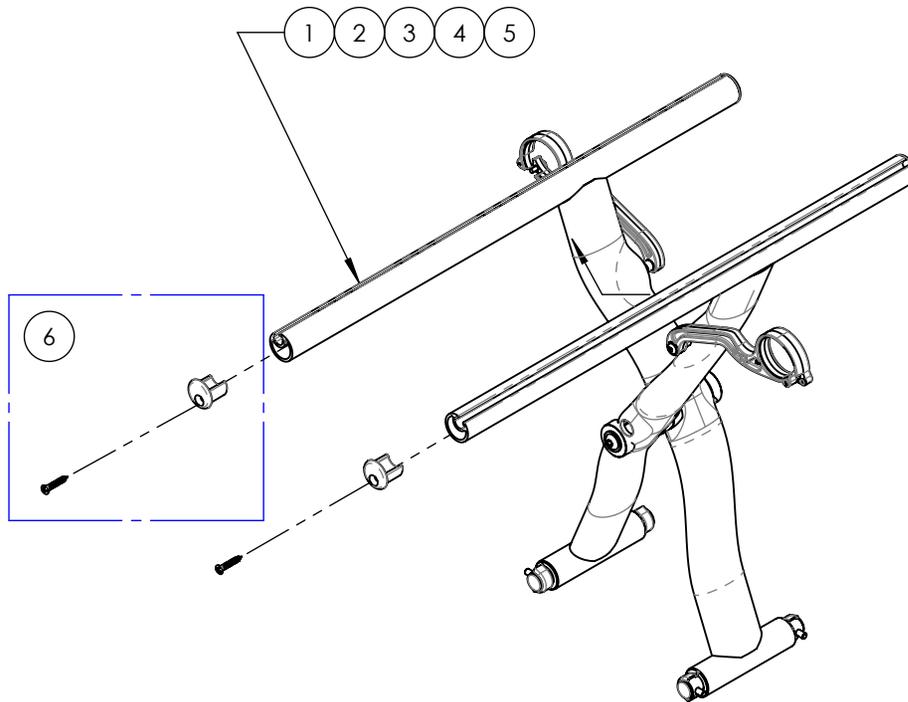


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9007646B 9007652B**  
**CADRE - T5S ALU, DROITE**

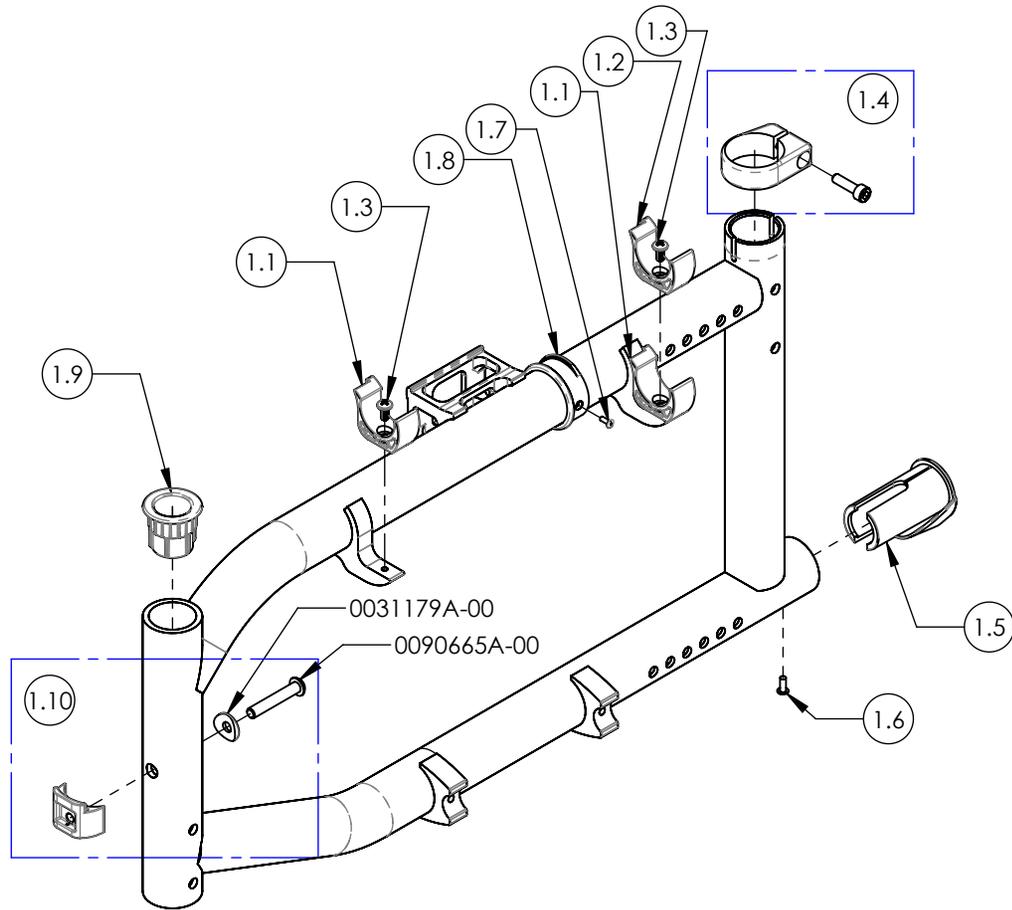


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                 | QTÉ |
|----------|-------------|---|-----|
| 1        | 9010432A    | CADRE - COMP, T5S ALU                       | 1   |
| 1.1      | 0021023A-00 | H-BLOCK V2                                  | 2   |
| 1.2      | 0006910A-00 | H-BLOCK V2.1                                | 1   |
| 1.3      | 0090988A-00 | VIS TÊTE CYL LARGE PHILLIPS M4x0.7x8mm L    | 2   |
| 1.4      | 0032538B-00 | BAGUE SERRAGE DOSSIER ID 32mm - ASSY        | 1   |
| 1.5      | 0011033A-00 | MANCHON PROTECTEUR ANTI-BASCULANT CADRE ALU | 1   |
| 1.6      | 0099661A-00 | POP RIVET 1/8 ODX.245 TÊTE (.126-.187po)    | 1   |
| 1.7      | 0099660A-00 | POP RIVET 3/32 ODX.187 TÊTE (.126-.250po)   | 1   |
| 1.8      | 0012140A-00 | GUIDE BIELLES                               | 1   |
| 1.9      | 0011013B-00 | RECEPTACLE APPUI PIED                       | 1   |
| 1.10     | 0031554A-00 | ANCRAGE APPUI PIED V2 - ASSEMBLAGE          | 1   |

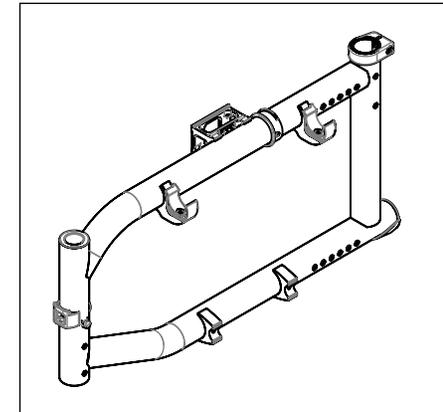


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9007653A\_9007659A**  
**CADRE - T5S ALU, GAUCHE**

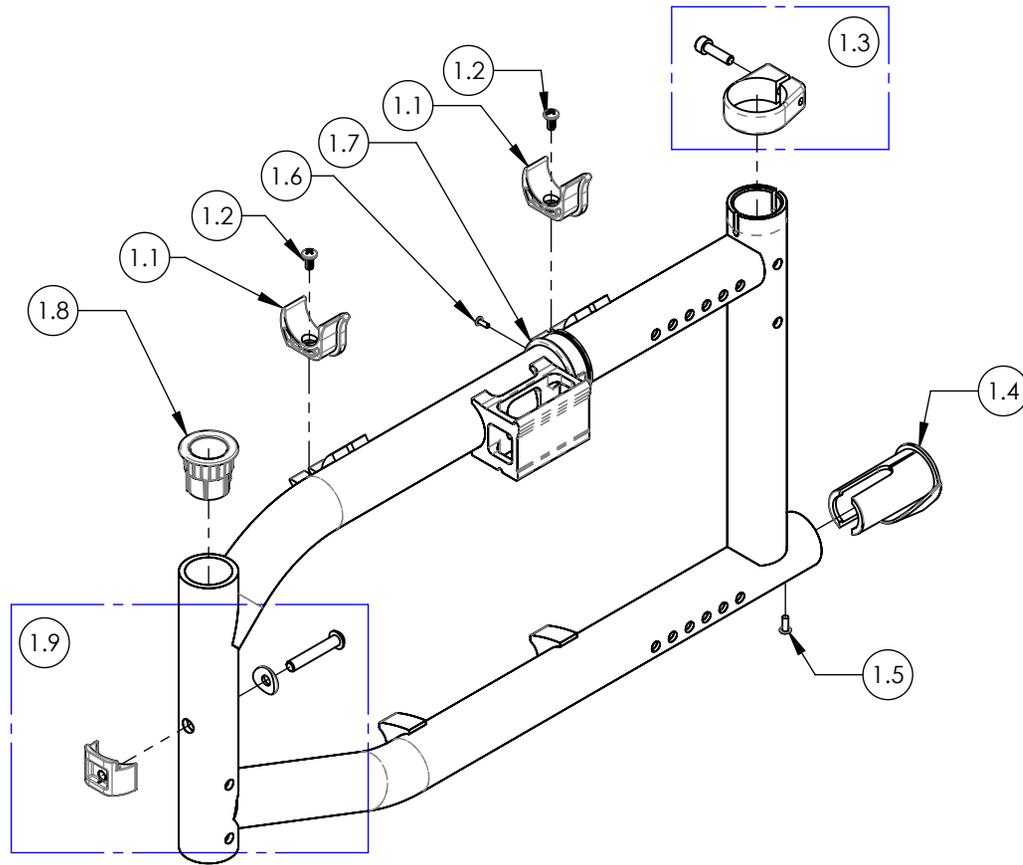

| No. ITEM | No. PIÈCE          | DESCRIPTION                                 | QTÉ      |
|----------|--------------------|---|----------|
| <b>1</b> | <b>9010432A-01</b> | <b>CADRE - COMP, T5S ALU, GAUCHE</b>        | <b>1</b> |
| 1.1      | 0021023A-00        | H-BLOCK V2                                  | 2        |
| 1.2      | 0090988A-00        | VIS TÊTE CYL LARGE PHILLIPS M4x0.7x8mm L    | 2        |
| 1.3      | 0032538B-00        | BAGUE SERRAGE DOSSIER ID 32mm - ASSY        | 1        |
| 1.4      | 0011033A-00        | MANCHON PROTECTEUR ANTI-BASCULANT CADRE ALU | 1        |
| 1.5      | 0099661A-00        | POP RIVET 1/8 ODX.245 TÊTE (.126-.187po)    | 1        |
| 1.6      | 0099660A-00        | POP RIVET 3/32 ODX.187 TÊTE (.126-.250po)   | 1        |
| 1.7      | 0012140A-00        | GUIDE BIELLES                               | 1        |
| 1.8      | 0011013B-00        | RECEPTACLE APPUI PIED                       | 1        |
| 1.9      | 0031554A-00        | ANCRAGE APPUI PIED V2 - ASSEMBLAGE          | 1        |

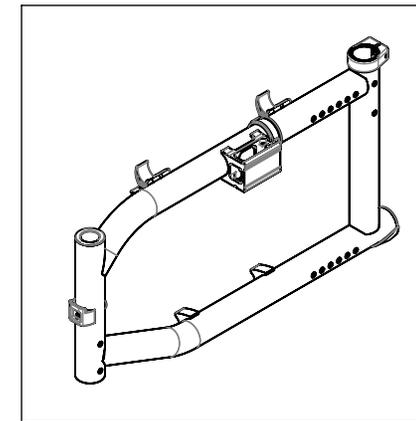


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


**9010432A**  
**FRAME - COMP, ALU T5S**

9010432A -

| NO. ITEM | NO. PIÈCE   | DESCRIPTION                                 | QTÉ |
|----------|-------------|---|-----|
| 1        | 0021023A-00 | H-BLOCK V2                                  | 2   |
| 2        | 0090988A-00 | VIS TÊTE CYL LARGE PHILLIPS M4x0.7x8mm L    | 2   |
| 3        | 0032538B-00 | BAGUE SERRAGE DOSSIER ID 32mm - ASSY        | 1   |
| 4        | 0011033A-00 | MANCHON PROTECTEUR ANTI-BASCULANT CADRE ALU | 1   |
| 5        | 0099661A-00 | POP RIVET 1/8 ODX.245 TÊTE (.126-.187po)    | 1   |
| 6        | 0099660A-00 | POP RIVET 3/32 ODX.187 TÊTE (.126-.250po)   | 1   |
| 7        | 0012140A-00 | GUIDE BIELLES                               | 1   |
| 8        | 0011013B-00 | RECEPTACLE APPUI PIED                       | 1   |
| 9        | 0031554A-00 | ANCRAGE APPUI PIED V2 - ASSEMBLAGE          | 1   |

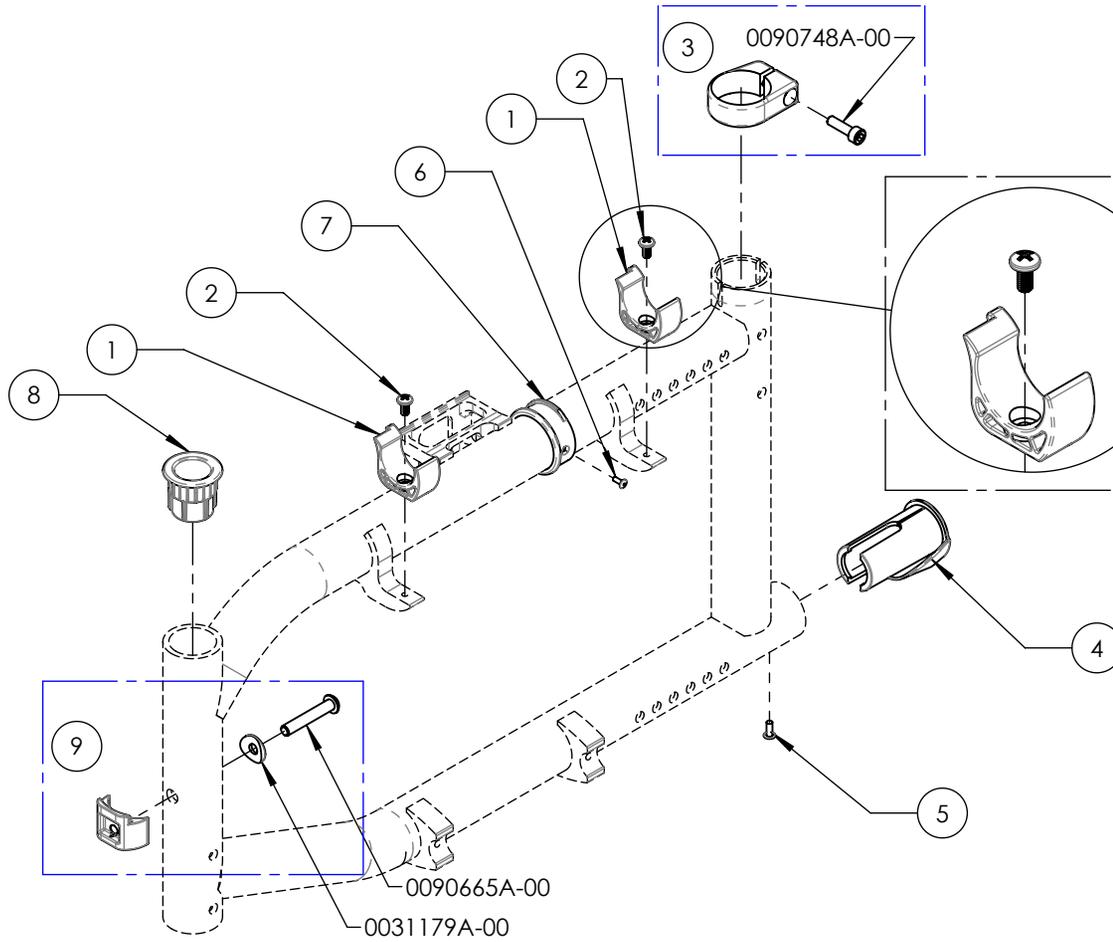


**SI LE CENTRE DE GRAVITÉ DU FAUTEUIL EST AJUSTÉ À **2-1/4"** (5,7cm) OU **2-3/4"** (7cm) VEUILLEZ UTILISER L'ITEM #0006910A-00**

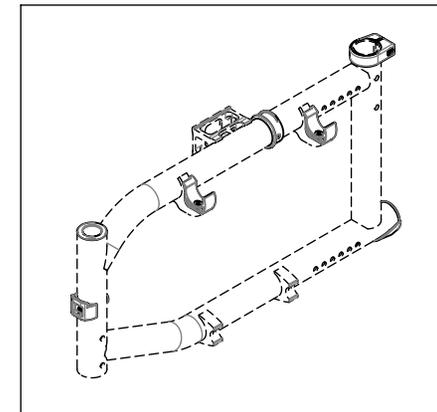


MAKE SURE TO HAVE YOUR SERIAL NUMBER NEARBY WHEN ORDERING PARTS FOR YOUR MOTION COMPOSITES WHEELCHAIR

**9001453A\_9001456A**  
**FOURCHE - POUR BARRURE DE FOURCHE**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                      | 9001453 | 9001454 | 9001455 | 9001456 |
|----------|-------------|--|---------|---------|---------|---------|
| 1        | 0022067A-00 | FOURCHE 3 x 1-1/2 USINÉE POUR BARRURE ROUE AVANT | 1       | -       | -       | -       |
| 2        | 0022064A-00 | FOURCHE 4x2 USINÉE POUR BARRURE ROUE AVANT       | -       | 1       | -       | -       |
| 3        | 0022065A-00 | FOURCHE 5x2 USINÉE POUR BARRURE ROUE AVANT       | -       | -       | 1       | -       |
| 4        | 0022066A-00 | FOURCHE 7x2 USINÉE POUR BARRURE ROUE AVANT       | -       | -       | -       | 1       |
| 5        | 0022060B-00 | RONDELLE BARRURE ROUE AVANT                      | 1       | 1       | 1       | 1       |

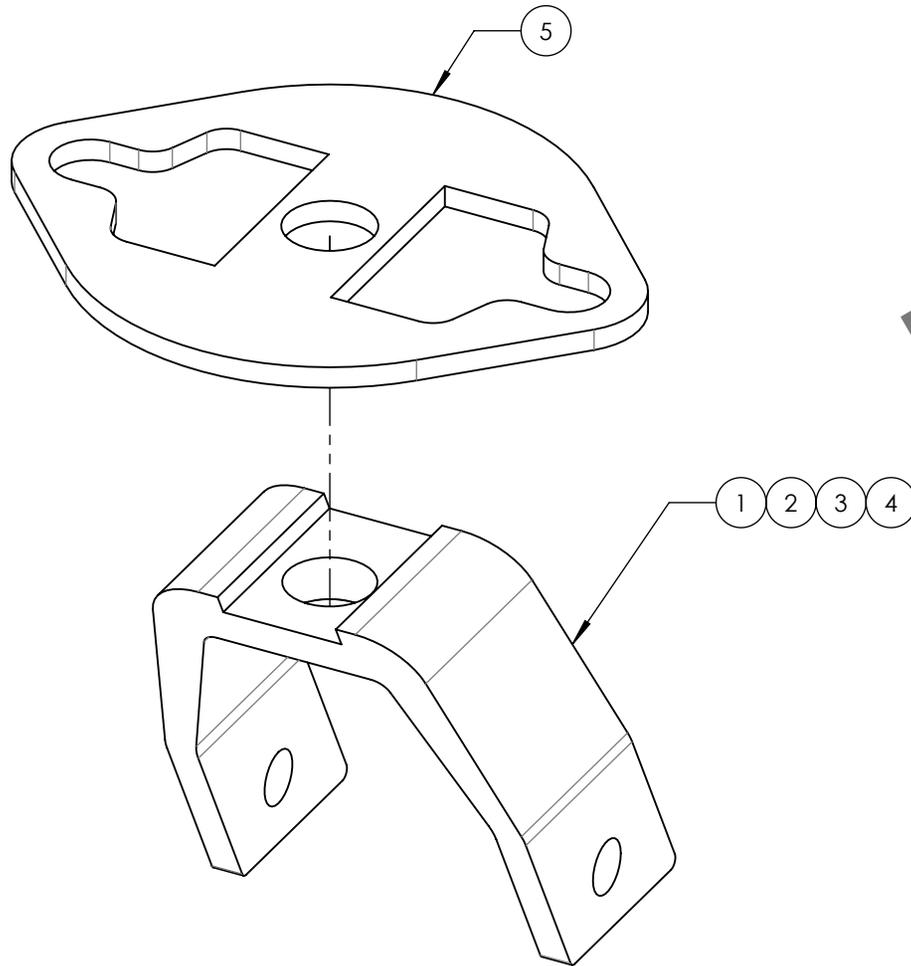


9001453A-00  
 FOURCHE - 3po POUR  
 BARRURE DE FOURCHE

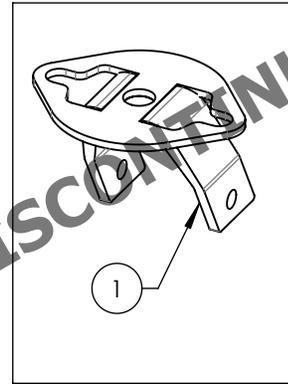


9001454A-00  
 FOURCHE - 4po POUR  
 BARRURE DE FOURCHE

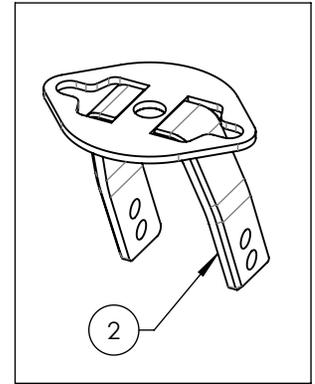

9001455A-00  
 FOURCHE - 5po POUR  
 BARRURE DE FOURCHE

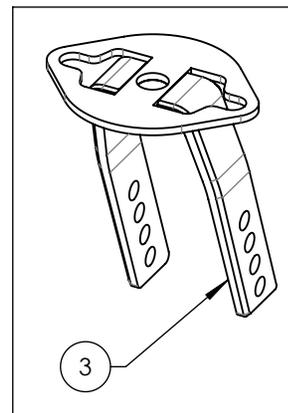



9001456A-00  
 FOURCHE - 7po POUR  
 BARRURE DE FOURCHE

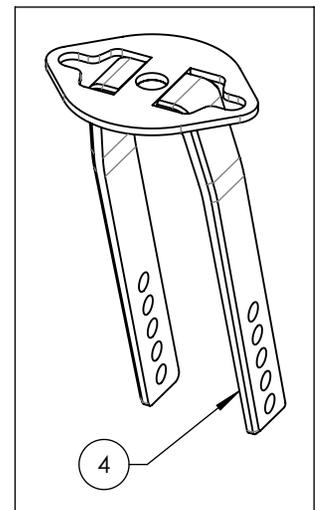

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001622A-00**  
**ANCRAGE - AVANT, STD**



| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                 | QTÉ |
|----------|-------------|-----------------------------|-----|
| 1        | 0022004C-00 | ANCRAGE                     | 1   |
| 2        | 0090659A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M6x1x16mm L | 2   |

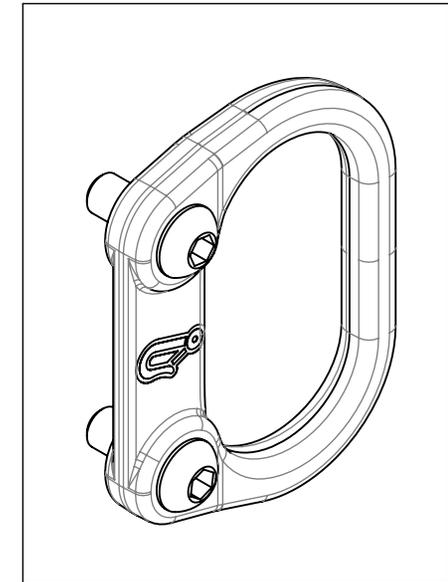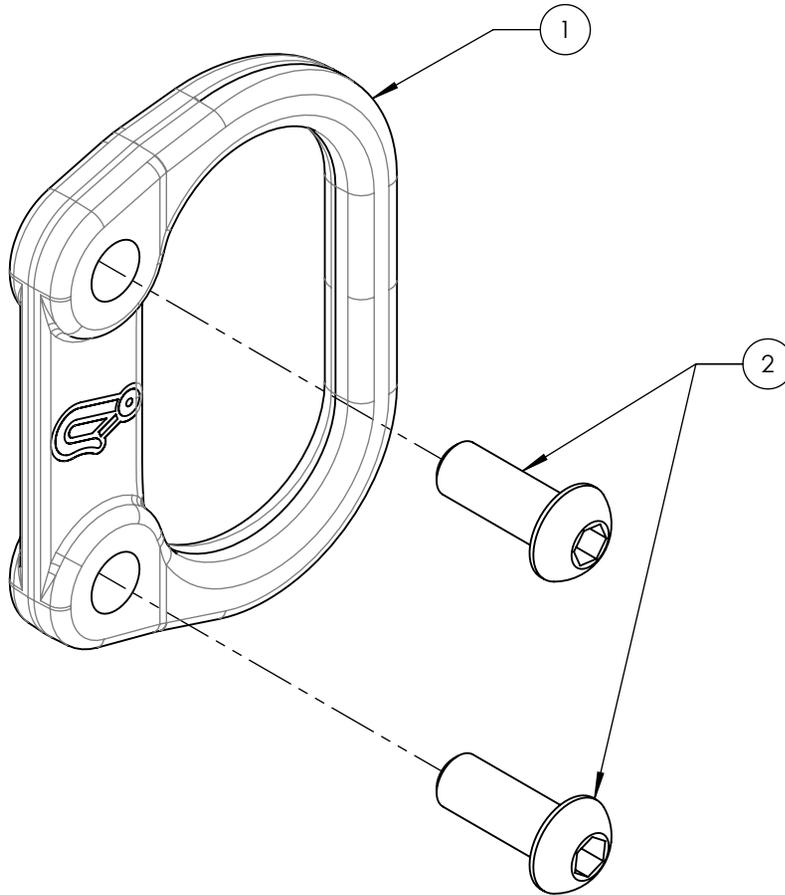

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001623A-00**  
**ANCRAGE - AVANT, POUR BARRURE DE FOURCHE +1po**



| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                              | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 1        | 0022061B-00 | ANCRAGE AVANT +1 POUR BARRURE ROUE AVANT | 1   |
| 2        | 0022063A-00 | MECANISME POUR BARRURE ROUE AVANT        | 1   |
| 3        | 0090659A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M6x1x16mm L              | 1   |
| 4        | 0090864A-00 | VIS TÊTE FRAISÉE M6x1x12mm L             | 1   |
| 5        | 0090748A-00 | VIS TÊTE CYLIND M5x0.8x18mm L            | 2   |

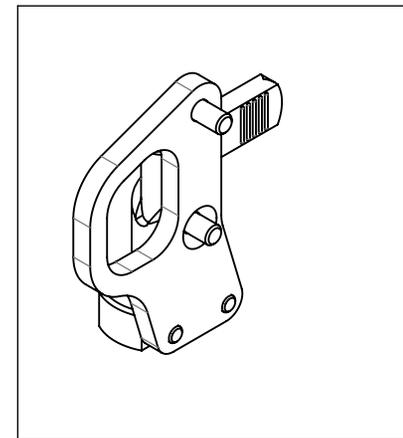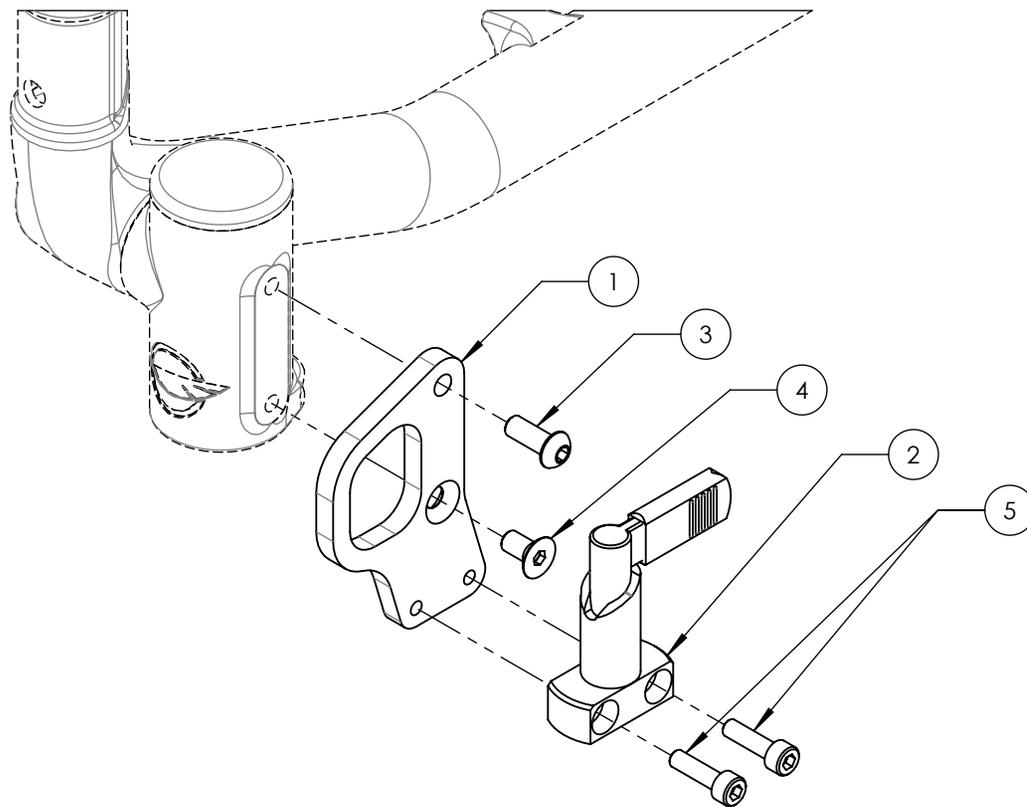

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001624A-00**  
**ANCRAGE - AVANT, POUR BARRURE DE FOURCHE +2po**




| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION  | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 1        | 0004751A-00 | ANCRAGE AVANT +2 BARRURE ROUE AVANT, PIÈCE DE BASE | 1   |
| 2        | 0022063A-00 | MECANISME POUR BARRURE ROUE AVANT                  | 1   |
| 3        | 0090659A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M6x1x16mm L                        | 2   |
| 4        | 0090748A-00 | VIS TÊTE CYLIND M5x0.8x18mm L                      | 2   |

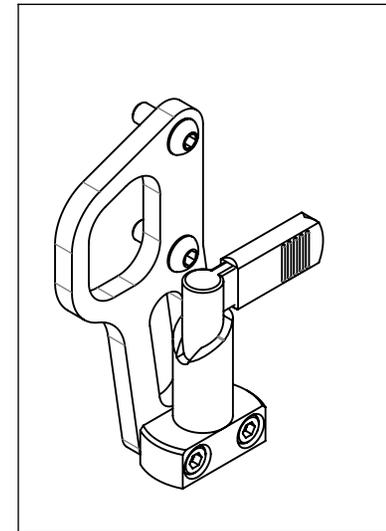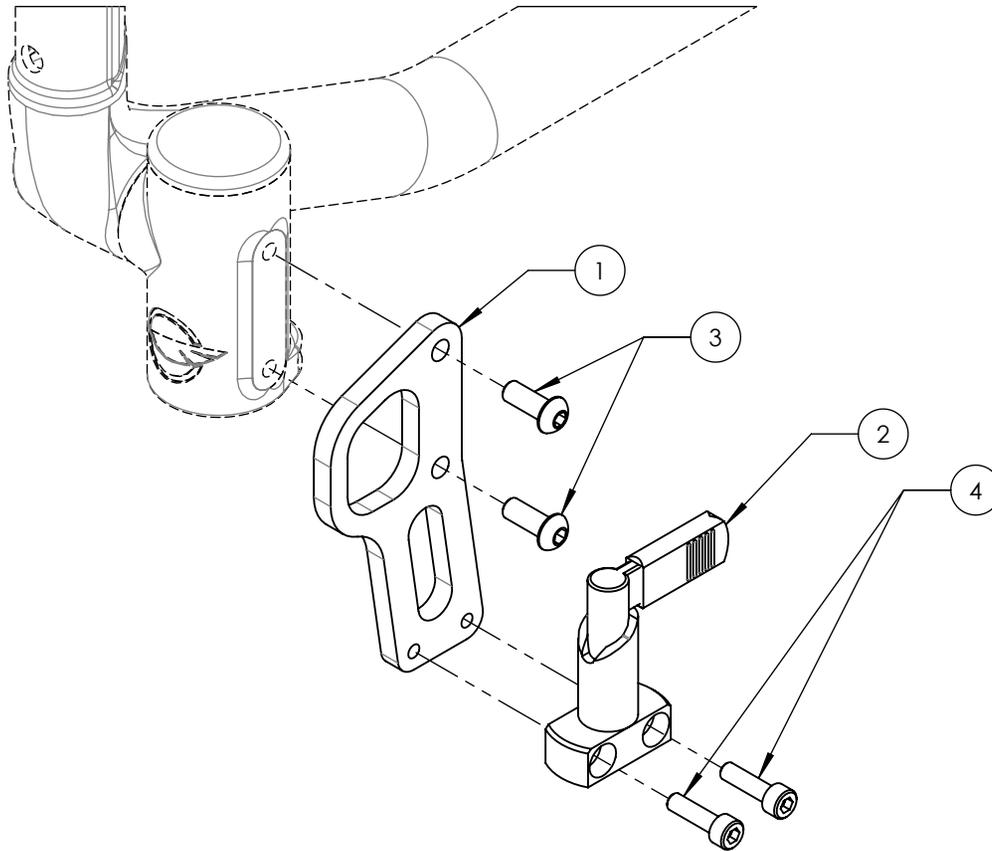


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9002418B 9002420B**  
**BÂTI-ROUE - MULTI AB & TIGE DE FOURCHE, DROITE**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                  | 9002418 | 9002419 | 9002420 |
|----------|-------------|--|---------|---------|---------|
| 1        | 9010345B-00 | BÂTI ROUE AVANT - ANTI-BATTEMENT, MP, DROITE | 1       | 1       | 1       |
| 2        | 9010318A-00 | TIGE DE FOURCHE - AF STD                     | 1       | -       | -       |
| 3        | 9010319A-00 | TIGE DE FOURCHE - AF +1po                    | -       | 1       | -       |
| 4        | 9010320A-00 | TIGE DE FOURCHE - AF +2 po                   | -       | -       | 1       |

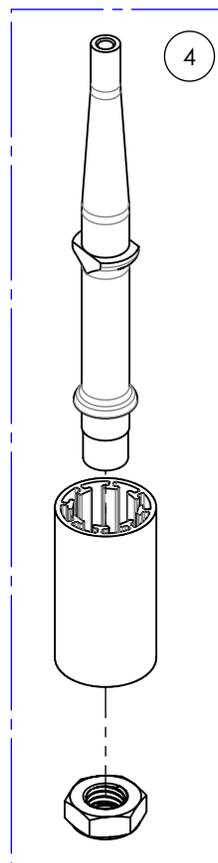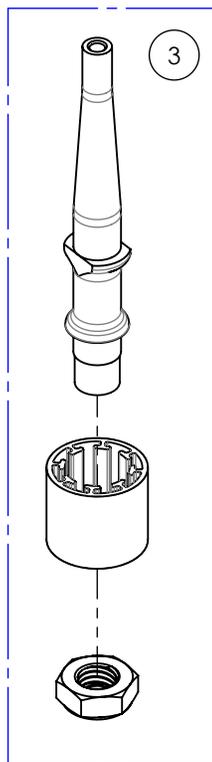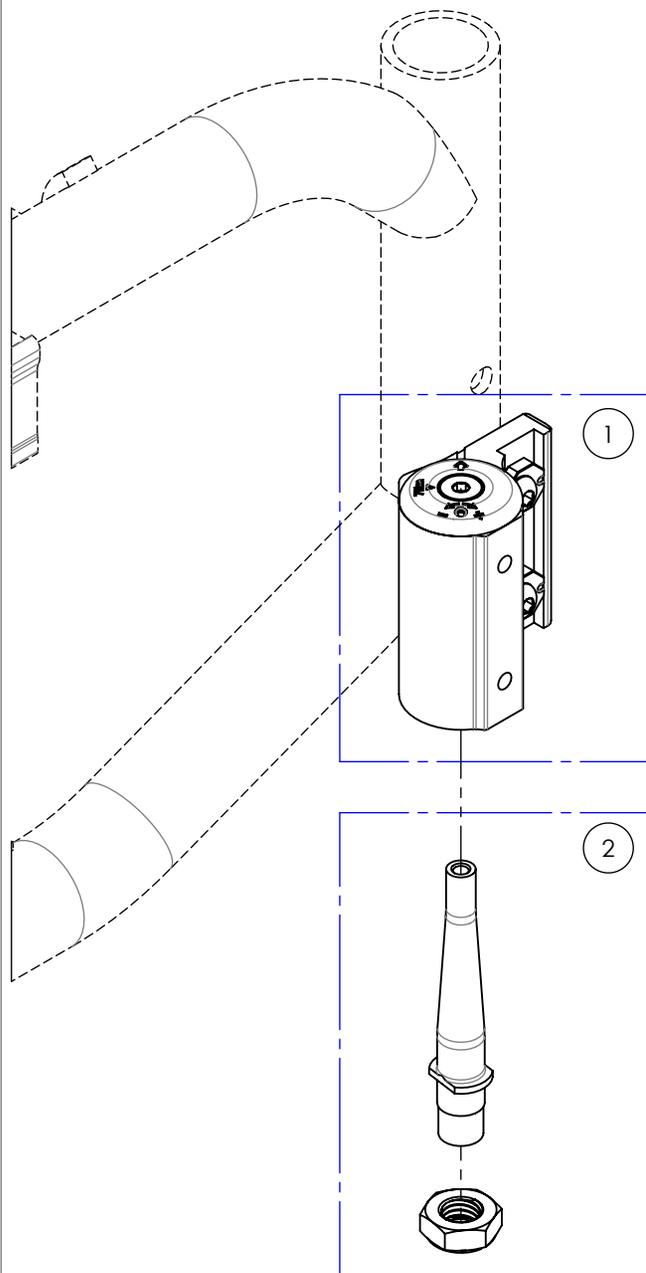


9002418A-00  
 BÂTI-ROUE - MULTI AB, TIGE DE  
 FOURCHE STD, DROITE

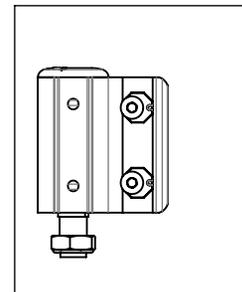

9002419A-00  
 BÂTI-ROUE - MULTI AB, TIGE DE  
 FOURCHE +1po, DROITE

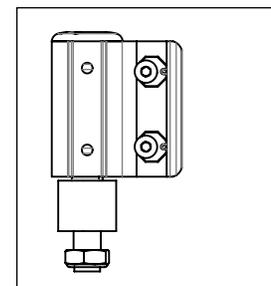


9002420A-00  
 BÂTI-ROUE - MULTI AB, TIGE DE  
 FOURCHE +2po, DROITE

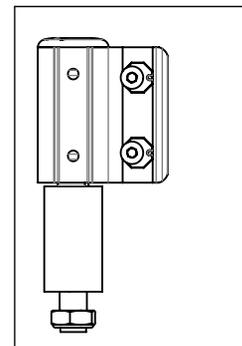


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9002421B\_9002423B**  
**BÂTI-ROUE - MULTI AB & TIGE DE FOURCHE, GAUCHE**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                  | 9002421 | 9002422 | 9002423 |
|----------|-------------|--|---------|---------|---------|
| 1        | 9010346B-00 | BÂTI ROUE AVANT - ANTI-BATTEMENT, MP, DROITE | 1       | 1       | 1       |
| 2        | 9010318A-00 | TIGE DE FOURCHE - AF STD                     | 1       | -       | -       |
| 3        | 9010319A-00 | TIGE DE FOURCHE - AF +1po                    | -       | 1       | -       |
| 4        | 9010320A-00 | TIGE DE FOURCHE - AF +2 po                   | -       | -       | 1       |

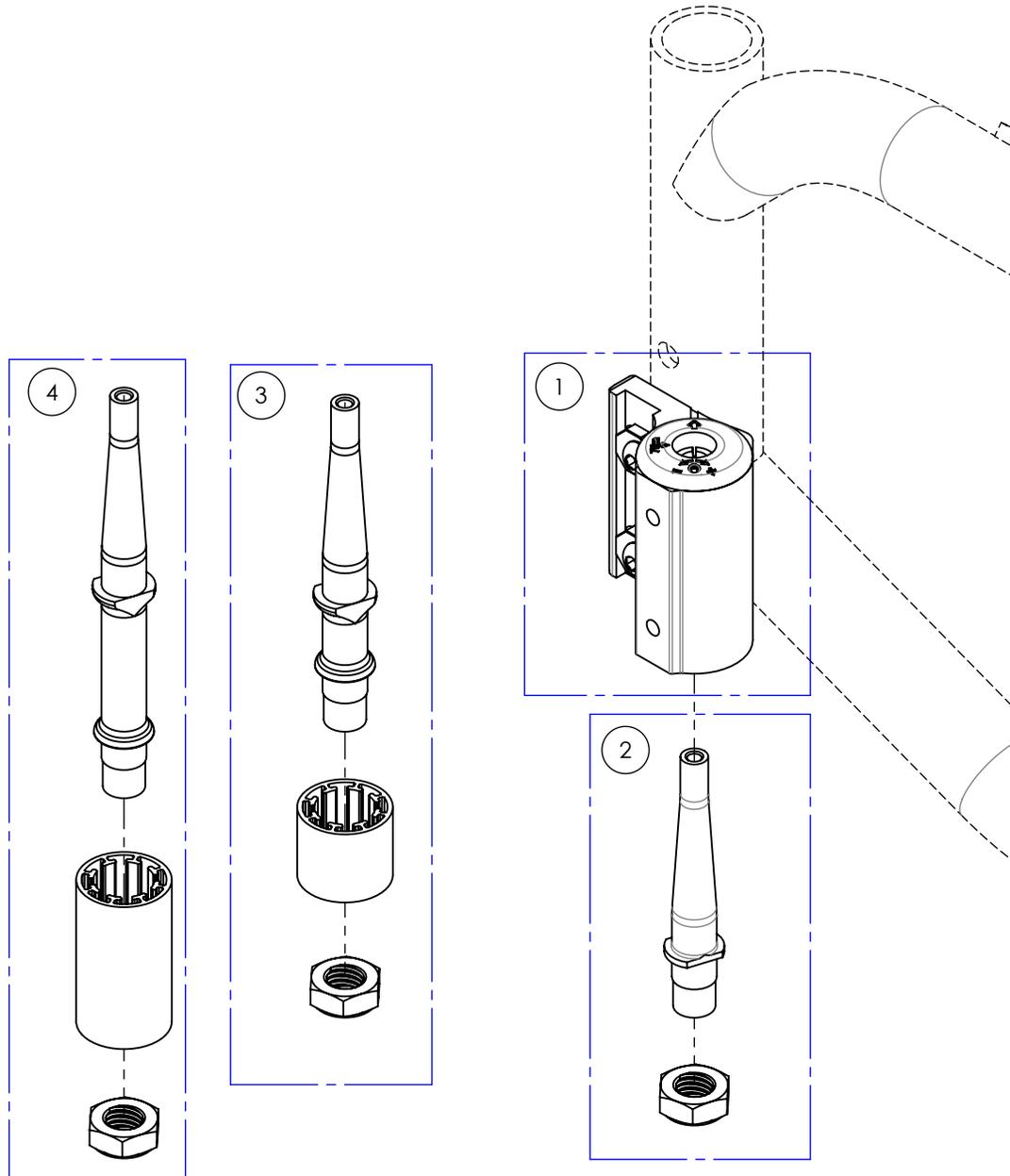


9002421B-00  
 BÂTI-ROUE - MULTI AB, TIGE DE  
 FOURCHE STD, GAUCHE

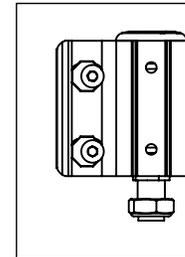

9002422B-00  
 BÂTI-ROUE - MULTI AB, TIGE DE  
 FOURCHE +1po, GAUCHE

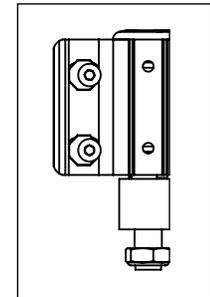


9002423B-00  
 BÂTI-ROUE - MULTI AB, TIGE DE  
 FOURCHE +2po, GAUCHE

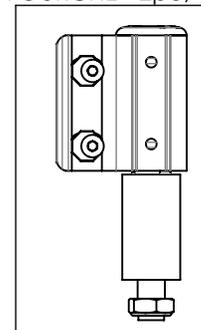


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9007915A\_9007916A**  
**FOURCHE & ROUE AVANT LARGE**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                      | 9007915 | 9007916 |
|----------|-------------|----------------------------------|---------|---------|
| 1        | 0022176A-00 | FOURCHE LARGE 7x2po              | 1       | 1       |
| 2        | 0022174A-00 | ROUE AVANT STANDARD 7x2po        | 1       | -       |
| 3        | 0022175A-00 | ROUE AVANT PNEUMATIQUE 8x2po     | -       | 1       |
| 4        | 0091022A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M8x1.25x70mm L   | 1       | 1       |
| 5        | 0090990A-00 | ÉCROU AUTOBLOQUANT MINCE M8x1.25 | 1       | 1       |

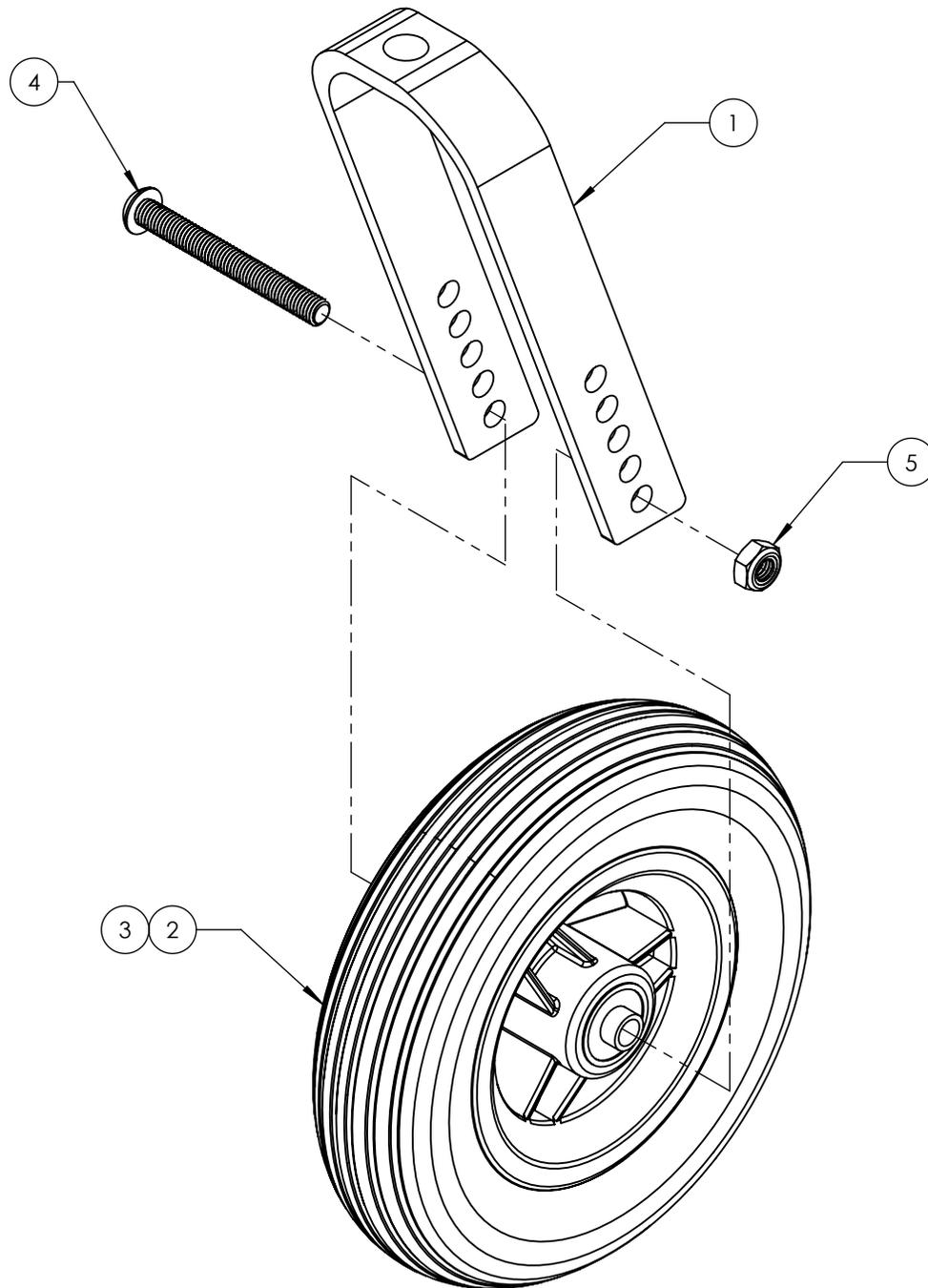

9007915A-00  
 FOURCHE & ROUE AVANT STD 7x2in

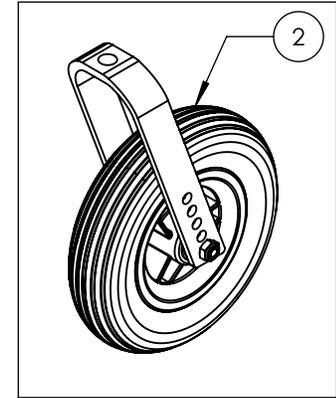

9007916A-00  
 FOURCHE & ROUE AVANT PNEUMATIQUE 8x2in

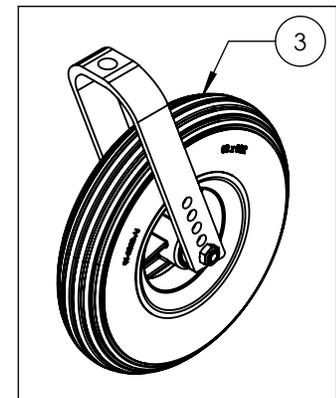


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


**9010318A\_9010320A**  
**TIGE DE FOURCHE - AF**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                       | 9002418 | 9002419 | 9002420 |
|----------|-------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| 1        | 0022090A-00 | TIGE DE FOURCHE STANDARD V2       | 1       | -       | -       |
| 2        | 0022091A-00 | TIGE DE FOURCHE +1 V2             | -       | 1       | -       |
| 3        | 0022092A-00 | TIGE DE FOURCHE +2 V2             | -       | -       | 1       |
| 4        | 0022149A-00 | CACHE POUR TIGE DE FOURCHE + 1 po | -       | 1       | -       |
| 5        | 0022150A-00 | CACHE POUR TIGE DE FOURCHE + 2 po | -       | -       | 1       |
| 6        | 0090992A-00 | ÉCROU AUTOBLOQUANT MINCE M12x1.75 | 1       | 1       | 1       |


9010318A-00  
 TIGE DE FOURCHE - AF STD

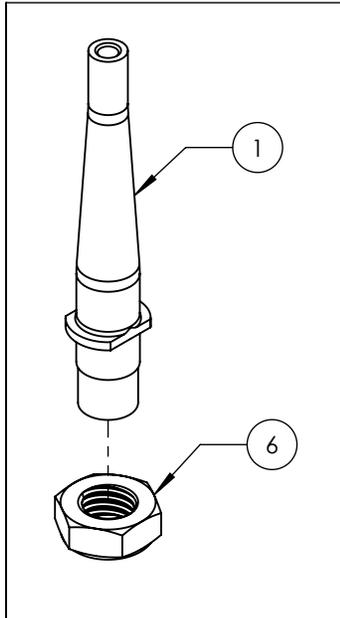

9010319A-00  
 TIGE DE FOURCHE - AF +1po

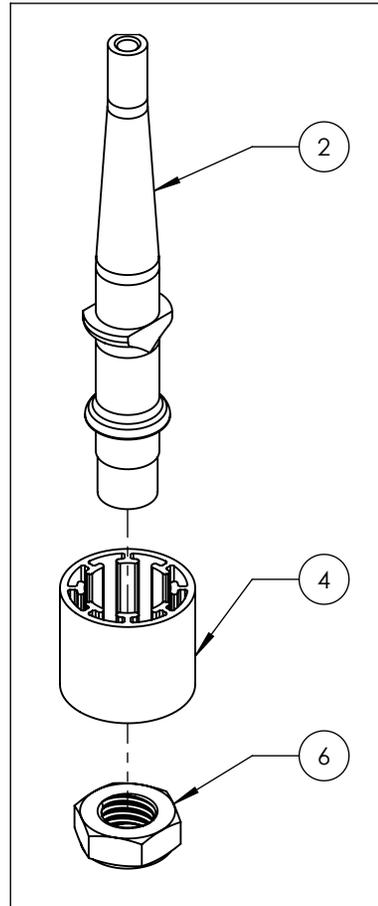




9010320A-00  
 TIGE DE FOURCHE - AF +2 po

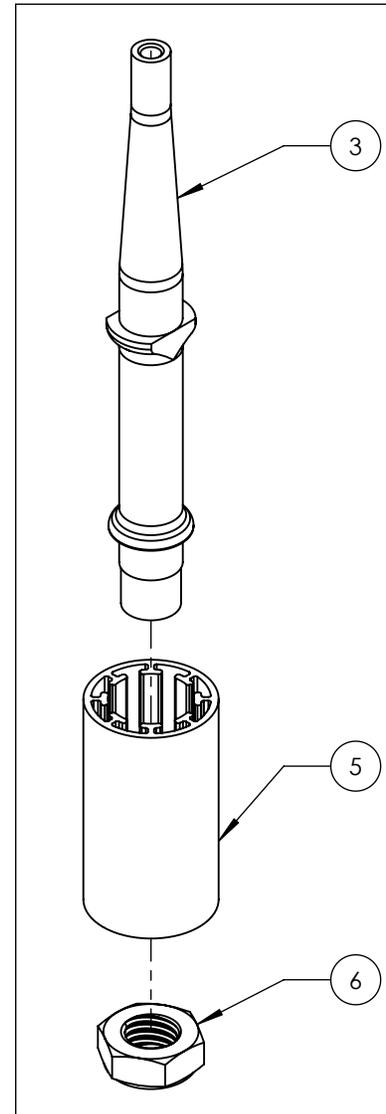

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9010345B-00**  
**BÂTI ROUE AVANT - ANTI-BATTEMENT, MP, DROITE**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                  | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 1        | 0022524A-00 | BATI ROUE AVANT ANTI-BATTEMENT T2, DROITE    | 1   |
| 2        | 0022080C-00 | PASTILLE EXCENTRIQUE BATIE ROUE AVANT T2     | 2   |
| 3        | 0004427A-00 | VIS ÉPAULEMENT M6x1, 6x25mm LONG. ÉPAULEMENT | 2   |
| 4        | 0022081A-00 | COEUR FIXATION BATIE ROUE AVANT T2           | 1   |
| 5        | 0022082B-00 | ESPACEUR DOUBLE BATI ROUE AVANT T2           | 1   |
| 6        | 0091038A-00 | VIS TÊTE CYLINDR USINÉE M5x0.8x12mm L        | 1   |
| 7        | 0022095A-00 | RONDELLE DÔMÉ POUR BOUCHON DE FRICTION       | 1   |
| 8        | 0004426A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M6x1x10mm L                  | 1   |

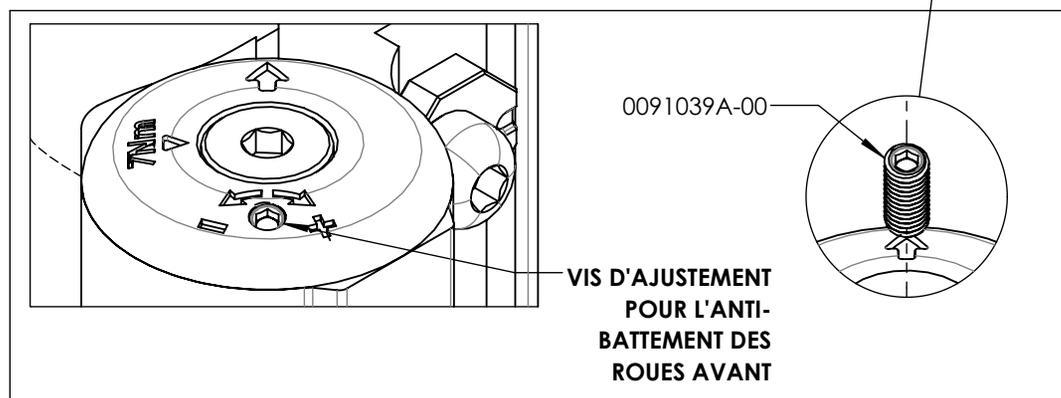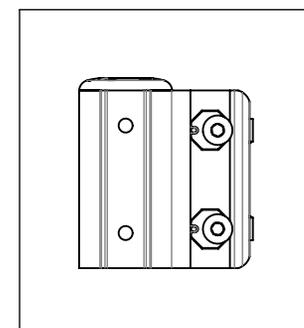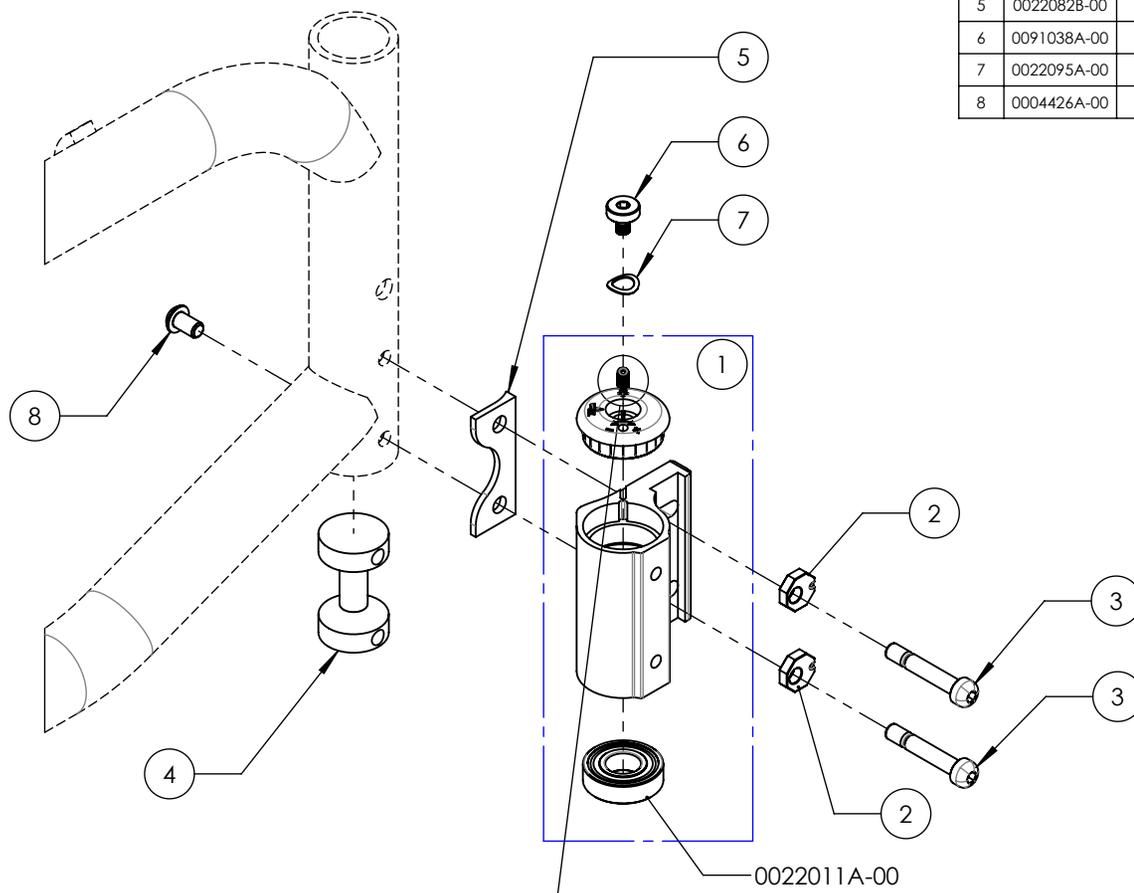


**VIS D'AJUSTEMENT  
 POUR L'ANTI-  
 BATTEMENT DES  
 ROUES AVANT**

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9010346B-00**  
**BÂTI ROUE AVANT - ANTI-BATTEMENT, MP, GAUCHE**

| N <sup>o</sup> . ITEM | N <sup>o</sup> . PIÈCE | DESCRIPTION                                 | QTÉ |
|-----------------------|------------------------|---|-----|
| 1                     | 0022525A-00            | BATI ROUE AVANT ANTI-BATTEMENT T2, GAUCHE   | 1   |
| 2                     | 0022080C-00            | PASTILLE EXCENTRIQUE BATIO ROUE AVANT T2    | 2   |
| 3                     | 0004427A-00            | VIS ÉPAULEMENT M6x1.6x25mm LONG, ÉPAULEMENT | 2   |
| 4                     | 0022081A-00            | COEUR FIXATION BATIO ROUE AVANT T2          | 1   |
| 5                     | 0022082B-00            | ESPACEUR DOUBLE BATIO ROUE AVANT T2         | 1   |
| 6                     | 0091038A-00            | VIS TÊTE CYLINDR USINÉE M5x0.8x12mm L       | 1   |
| 7                     | 0022095A-00            | RONDELLE DÔMÉ POUR BOUCHON DE FRICTION      | 1   |
| 8                     | 0004426A-00            | VIS TÊTE BOMBÉE M6x1x10mm L                 | 1   |

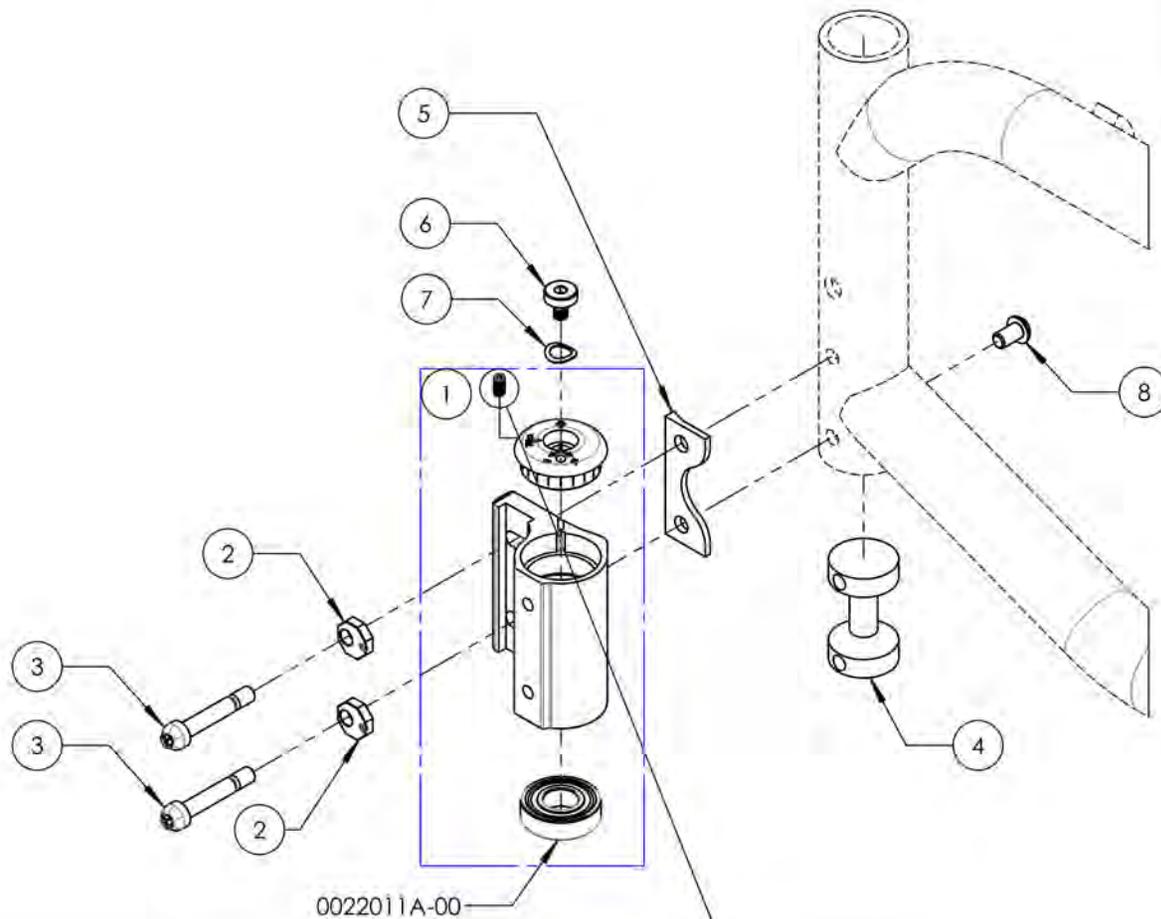


0022011A-00



**VIS D'AJUSTEMENT  
 POUR L'ANTI-  
 BATTEMENT DES  
 ROUES AVANT**


0091039A-00

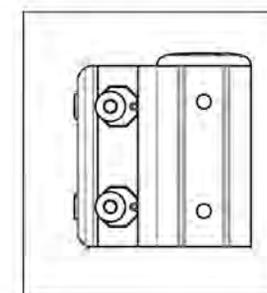


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9010362A\_9010364A**  
**FOURCHE - FROG LEGS, PHASE-TWO, SAAF (PAIRE)**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                         | 9010362 | 9010363 | 9010364 |
|----------|-------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1        | 0022172A-00 | FOURCHE FROG LEGS PHASE-TWO (PAIRE) | 1       | 1       | 1       |
| 2        | 0022153A-00 | TIGE DE FOURCHE SAAF STD            | 2       | -       | -       |
| 3        | 0022149A-00 | CACHE POUR TIGE DE FOURCHE + 1 po   | -       | 2       | -       |
| 4        | 0022150A-00 | CACHE POUR TIGE DE FOURCHE + 2 po   | -       | -       | 2       |
| 5        | 0022154A-00 | TIGE DE FOURCHE SAAF +1             | -       | 2       | -       |
| 6        | 0022155A-00 | TIGE DE FOURCHE SAAF +2             | -       | -       | 2       |

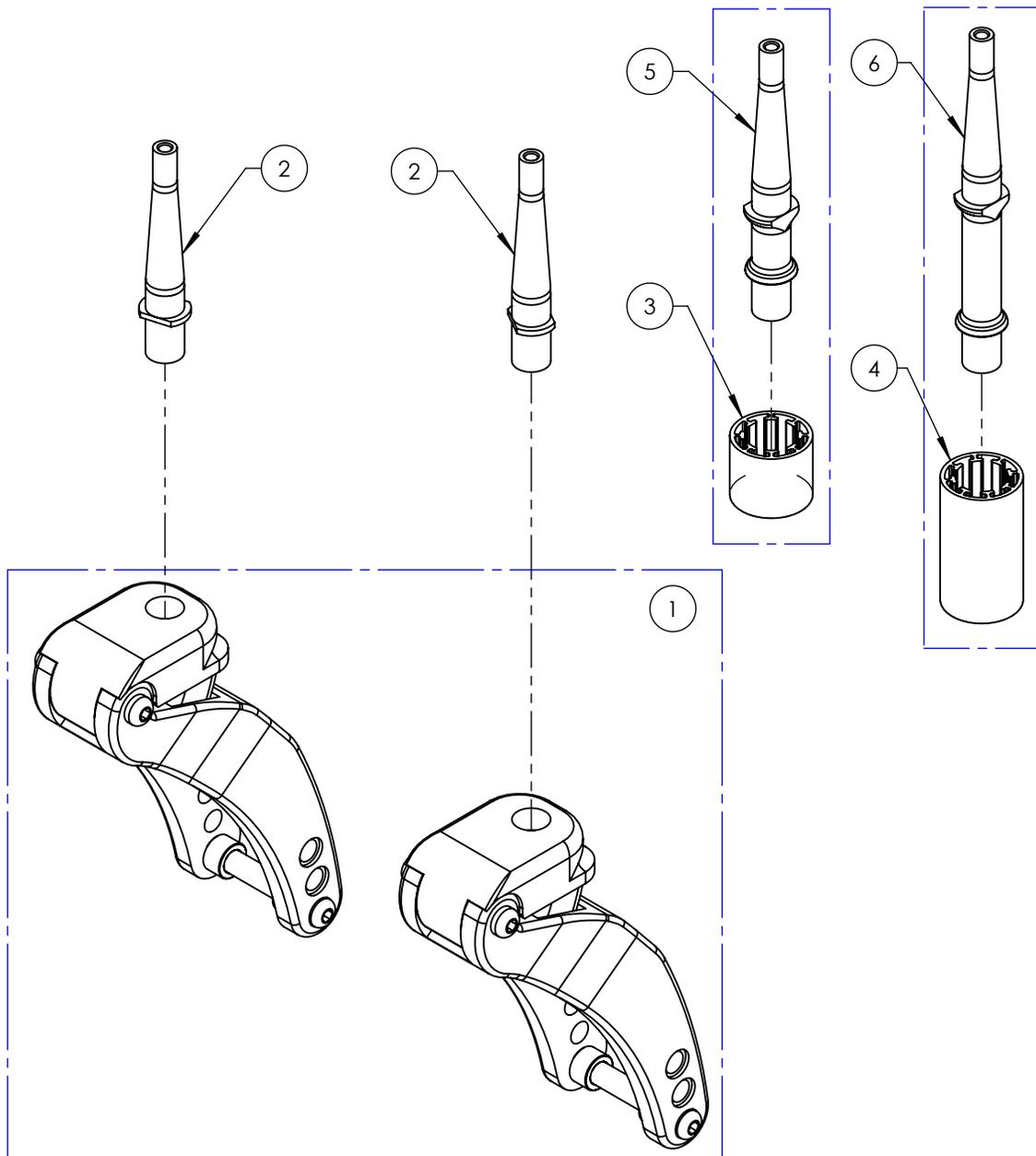


9010362A-00  
 FOURCHE - FROG LEGS, PHASE-TWO, SAAF STD (PAIRE)

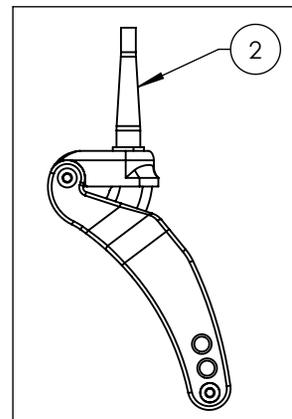

9010363A-00  
 FOURCHE - FROG LEGS, PHASE-TWO, SAAF +1po (PAIRE)

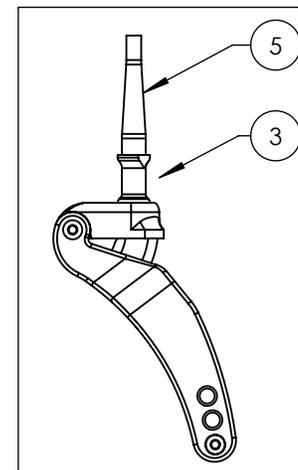


9010364A-00  
 FOURCHE - FROG LEGS, PHASE-TWO, SAAF +2po (PAIRE)

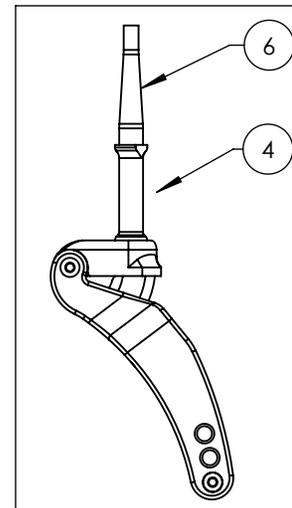


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue de roues avant  
Barrure de fourche**

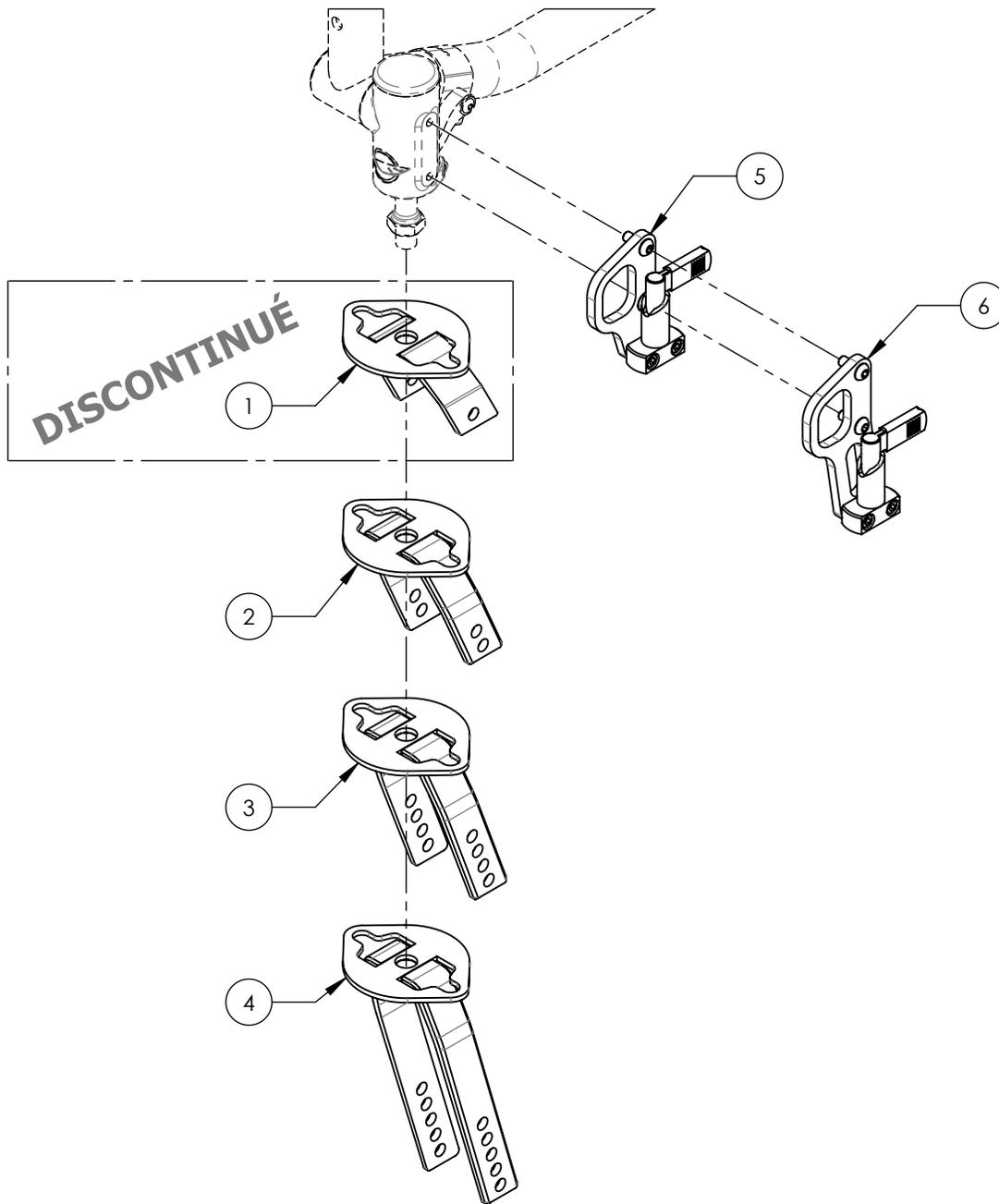


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                   | QTÉ |
|----------|-------------|---|-----|
| 1        | 9001453A-00 | FOURCHE - 3po POUR BARRURE DE FOURCHE         | 1   |
| 2        | 9001454A-00 | FOURCHE - 4po POUR BARRURE DE FOURCHE         | 1   |
| 3        | 9001455A-00 | FOURCHE - 5po POUR BARRURE DE FOURCHE         | 1   |
| 4        | 9001456A-00 | FOURCHE - 7po POUR BARRURE DE FOURCHE         | 1   |
| 5        | 9001623A-00 | ANCRAGE - AVANT, POUR BARRURE DE FOURCHE +1po | 1   |
| 6        | 9001624A-00 | ANCRAGE - AVANT, POUR BARRURE DE FOURCHE +2po | 1   |

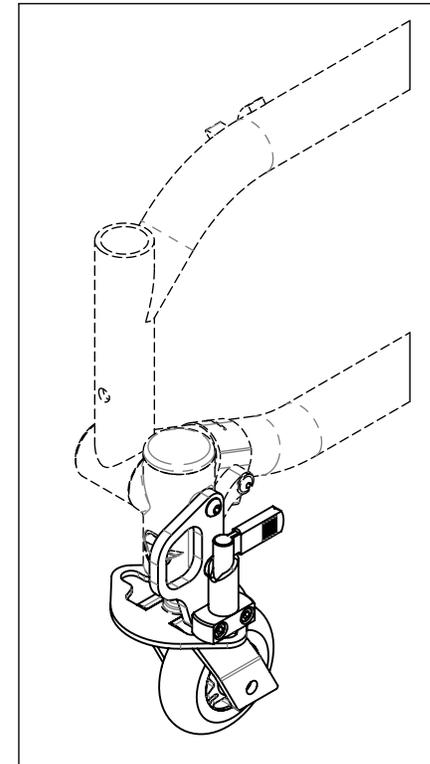

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue de roues avant**  
**Fourches à suspension Frog Legs**

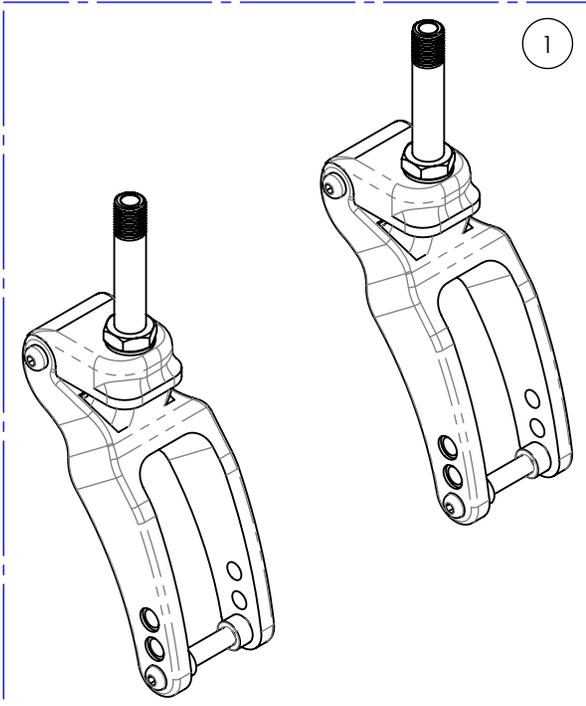


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                       | QTÉ |
|----------|-------------|---|-----|
| 1        | 0022172A-00 | FOURCHE FROG LEGS PHASE-TWO (PAIRE)               | 1   |
| 2        | 9010362A-00 | FOURCHE - FROG LEGS, PHASE-TWO, SAAF STD (PAIRE)  | 1   |
| 3        | 9010363A-00 | FOURCHE - FROG LEGS, PHASE-TWO, SAAF +1po (PAIRE) | 1   |
| 4        | 9010364A-00 | FOURCHE - FROG LEGS, PHASE-TWO, SAAF +2po (PAIRE) | 1   |

NOTE: VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE AVANT DE COMMANDER LES FOURCHES À SUSPENSION FROG LEGS

VEUILLEZ SPÉCIFIER




- POIDS DE L'UTILISATEUR
- HAUTEUR SOL-SIÈGE AVANT
- DIMENSION DES ROUES AVANT

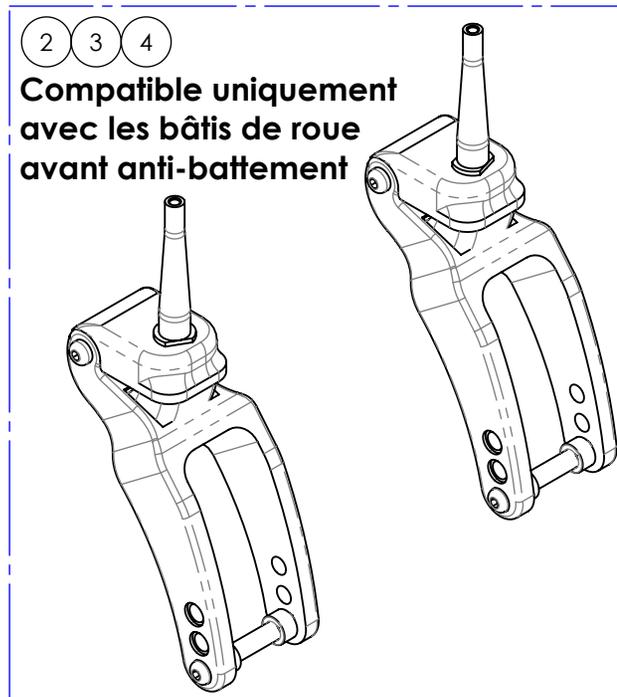

**Compatible uniquement  
 avec les bâtis de roue  
 avant anti-battement**




**Catalogue de roues avant**  
**Fourches standards**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION   | QTÉ |
|----------|-------------|---------------|-----|
| 1        | 9001450B-00 | FOURCHE - 4PO | 1   |
| 2        | 9001451B-00 | FOURCHE - 5PO | 1   |
| 3        | 9001452B-00 | FOURCHE - 7PO | 1   |

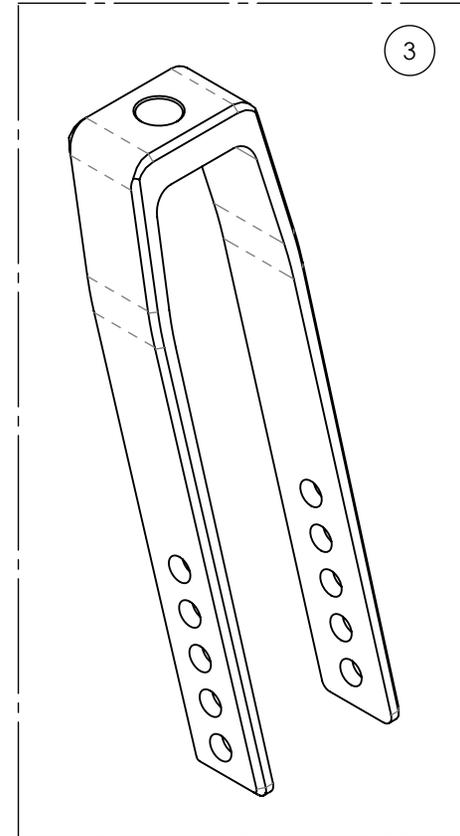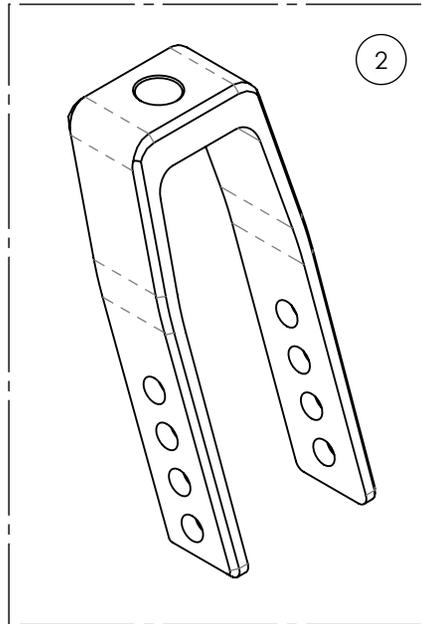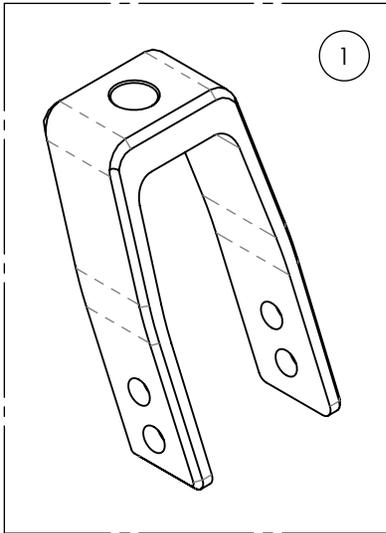

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue de roues avant**  
**Roues avant**

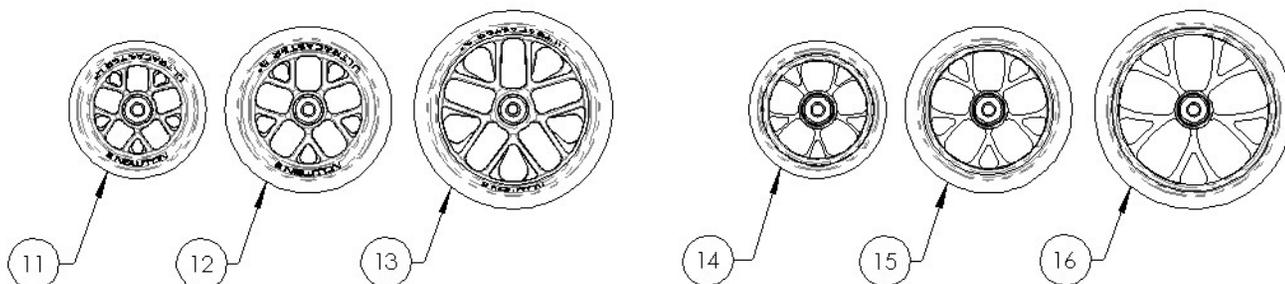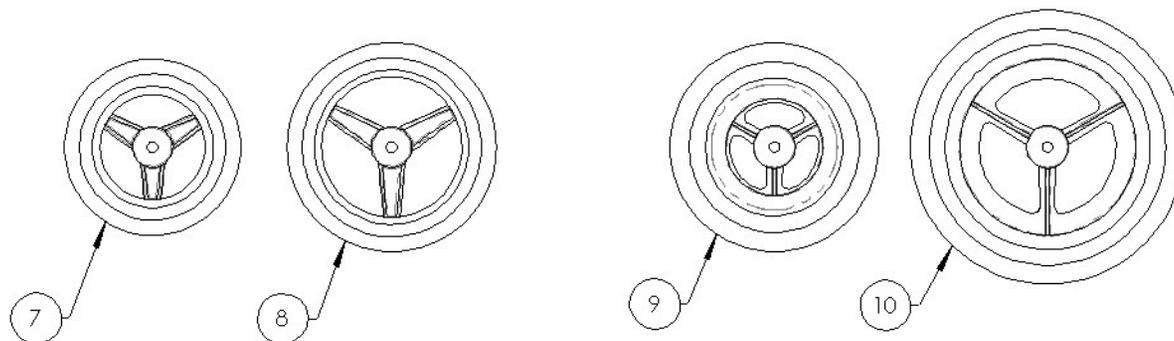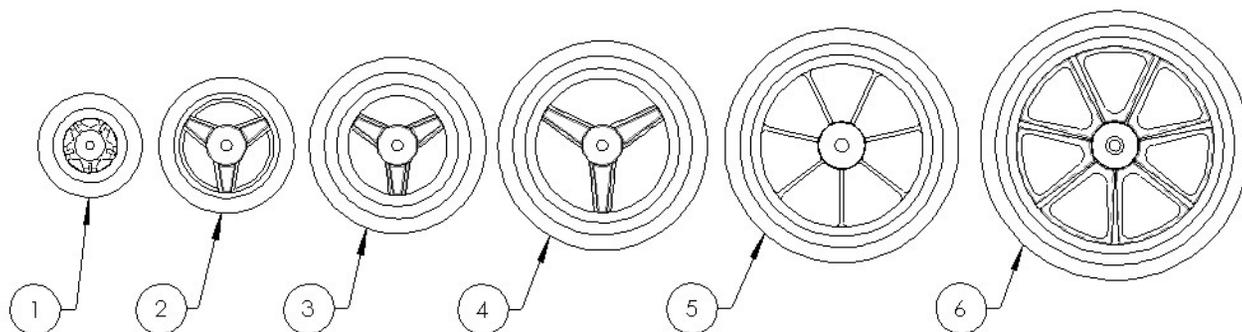

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                  | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 1        | 0022016A-00 | ROUE AVANT STANDARD 3x1 p o                  | 1   |
| 2        | 0022017A-00 | ROUE AVANT STANDARD 4x1 p o                  | 1   |
| 3        | 0022018A-00 | ROUE AVANT STANDARD 5x1 p o                  | 1   |
| 4        | 0022019A-00 | ROUE AVANT STANDARD 6x1 p o                  | 1   |
| 5        | 0022020A-00 | ROUE AVANT STANDARD 7x1 p o                  | 1   |
| 6        | 0022021A-00 | ROUE AVANT STANDARD 8x1 p o                  | 1   |
| 7        | 0022158A-00 | ROUE AVANT STANDARD COMPOSITE 5x1 1/2p o     | 1   |
| 8        | 0022159A-00 | ROUE AVANT STANDARD COMPOSITE 6x1 1/2p o     | 1   |
| 9        | 0022025A-00 | ROUE AVANT PNEUMATIC 6x1 1/4p o              | 1   |
| 10       | 0022027A-00 | ROUE AVANT PNEUMATIC 8x1 1/4p o              | 1   |
| 11       | 0022514A-00 | ROUE NEWTON ULTRACASTER PLASTIQUE 4x1 1/2p o | 1   |
| 12       | 0022515A-00 | ROUE NEWTON ULTRACASTER PLASTIQUE 5x1 1/2p o | 1   |
| 13       | 0022516A-00 | ROUE NEWTON ULTRACASTER PLASTIQUE 6x1 1/2p o | 1   |
| 14       | 0022517A-00 | ROUE NEWTON ULTRACASTER ALU 4x1 1/2p o       | 1   |
| 15       | 0022518A-00 | ROUE NEWTON ULTRACASTER ALU 5x1 1/2p o       | 1   |
| 16       | 0022519A-00 | ROUE NEWTON ULTRACASTER ALU 6x1 1/2p o       | 1   |

**REPLACEMENT DE ROUEMENT A BILLES**

**ROUES ULTRACASTER**

0022514A-00 à 0022519A-00

**NoPIÈCE: 0022037A-00**

**ROUES DURES & PNEUMATIQUES**





0022016A-00 à 0022021A-00

0022158A-00 & 0022159A-00

0022025A-00 & 0022027A-00


**NoPIÈCE: 0022038A-00**

**Catalogue de roues avant  
Quincaillerie**

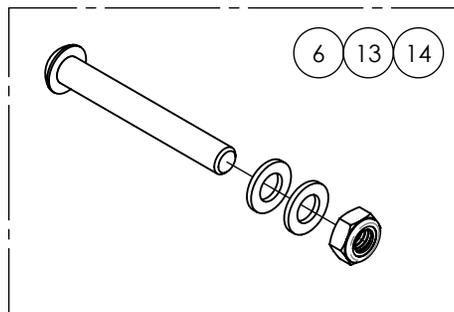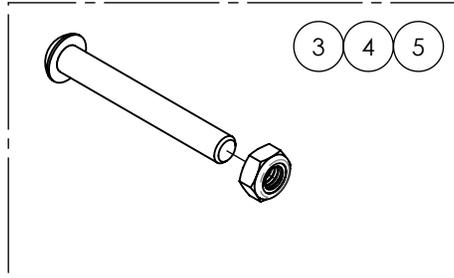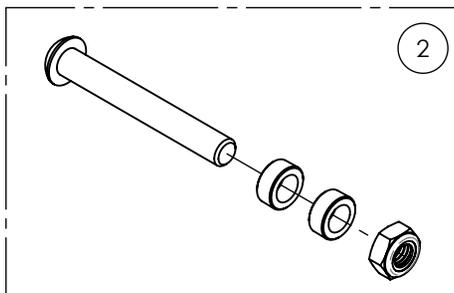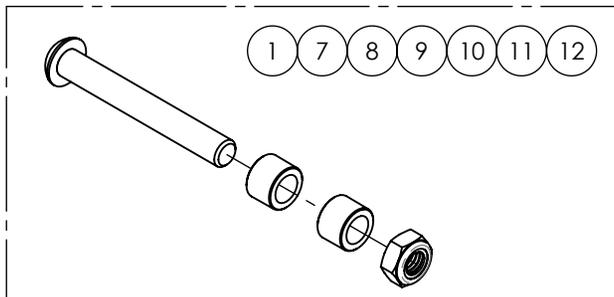


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION  | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 1        | 9001416A-00 | QUINCAILLERIE - POUR ROUE AVANT DURE 3x1po         | 1   |
| 2        | 9001417A-00 | QUINCAILLERIE - POUR ROUE AVANT DURE 4x1po         | 1   |
| 3        | 9001418A-00 | QUINCAILLERIE - POUR ROUE AVANT DURE 5x1po         | 1   |
| 4        | 9001419A-00 | QUINCAILLERIE - POUR ROUE AVANT DURE 6x1po         | 1   |
| 5        | 9001420A-00 | QUINCAILLERIE - POUR ROUE AVANT DURE 7x1po         | 1   |
| 6        | 9001421A-00 | QUINCAILLERIE - POUR ROUE AVANT DURE 8x1po         | 1   |
| 7        | 9001422A-00 | QUINCAILLERIE - POUR NEWTON ULTRACASTER, 4x1½po    | 1   |
| 8        | 9001423A-00 | QUINCAILLERIE - POUR NEWTON ULTRACASTER, 5x1½po    | 1   |
| 9        | 9001424A-00 | QUINCAILLERIE - POUR NEWTON ULTRACASTER, 6x1½po    | 1   |
| 10       | 9001425A-00 | QUINCAILLERIE - POUR ROUE AVANT DURE ALU 4x1po     | 1   |
| 11       | 9001426A-00 | QUINCAILLERIE - POUR ROUE AVANT DURE ALU 5x1po     | 1   |
| 12       | 9001427A-00 | QUINCAILLERIE - POUR ROUE AVANT DURE ALU 6x1po     | 1   |
| 13       | 9001428A-00 | QUINCAILLERIE - POUR ROUE AVANT PNEUMATIQUE 6x1¼po | 1   |
| 14       | 9001429A-00 | QUINCAILLERIE - POUR ROUE AVANT PNEUMATIQUE 8x1¼po | 1   |

**Catalogue de roues avant**  
**Bâti de roue avant anti-batteement à pastilles multi-position**

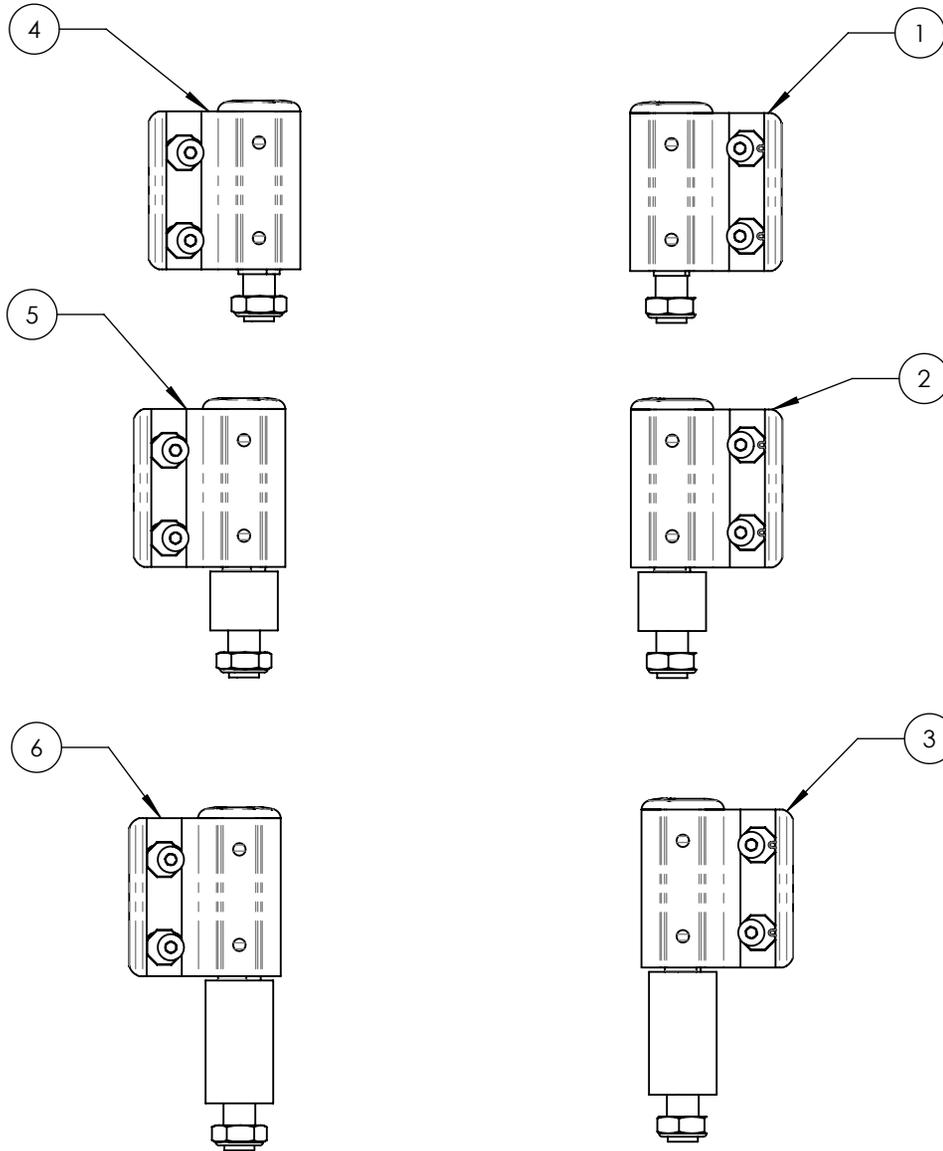

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION  | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 1        | 9002418B-00 | BÂTI-ROUE - MULTI AB, TIGE DE FOURCHE STD, DROITE  | 1   |
| 2        | 9002419B-00 | BÂTI-ROUE - MULTI AB, TIGE DE FOURCHE +1po, DROITE | 1   |
| 3        | 9002420B-00 | BÂTI-ROUE - MULTI AB, TIGE DE FOURCHE +2po, DROITE | 1   |
| 4        | 9002421B-00 | BÂTI-ROUE - MULTI AB, TIGE DE FOURCHE STD, GAUCHE  | 1   |
| 5        | 9002422B-00 | BÂTI-ROUE - MULTI AB, TIGE DE FOURCHE +1po, GAUCHE | 1   |
| 6        | 9002423B-00 | BÂTI-ROUE - MULTI AB, TIGE DE FOURCHE +2po, GAUCHE | 1   |
| 7        | 9001622A-00 | ANCRAGE - AVANT, STD                               | 1   |



**APPLICABLE SUR LES FAUTEUILS MOVE  
 DEPUIS 2018/03/22**

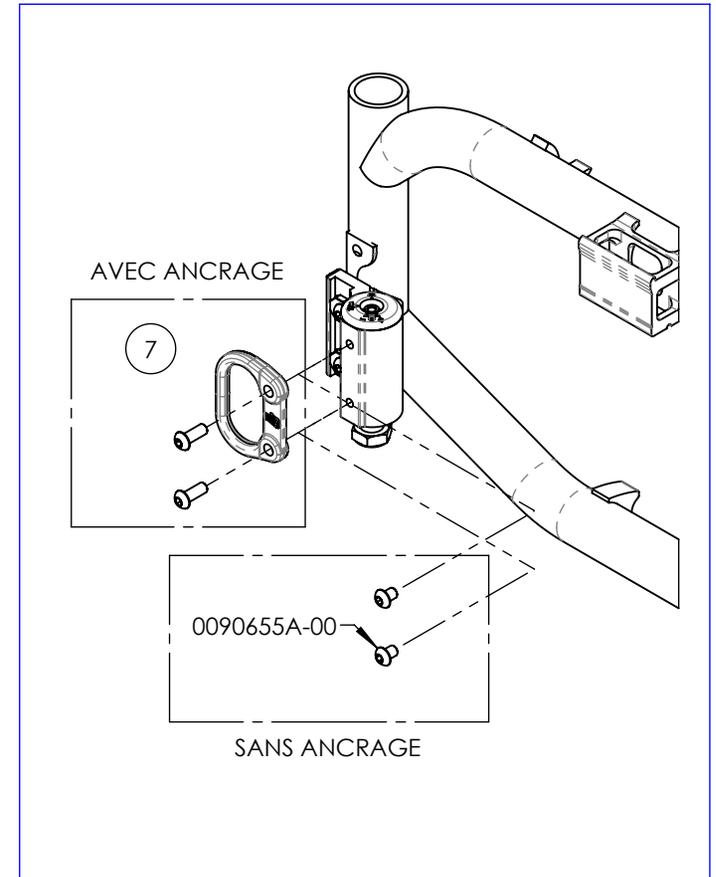

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**CATALOGUE DE ROUES AVANT  
FOURCHE ET ROUE AVANT LARGE**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                            | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 1        | 9007915A-00 | FOURCHE & ROUE AVANT STD 7x2in         | 1   |
| 2        | 9007916A-00 | FOURCHE & ROUE AVANT PNEUMATIQUE 8x2in | 1   |

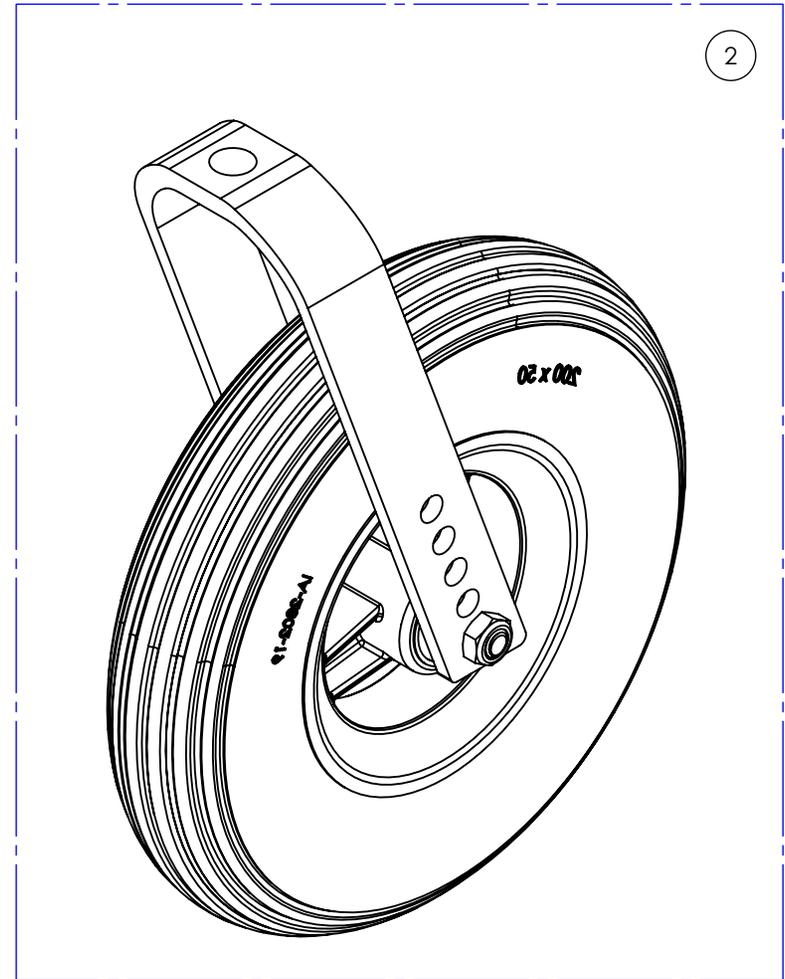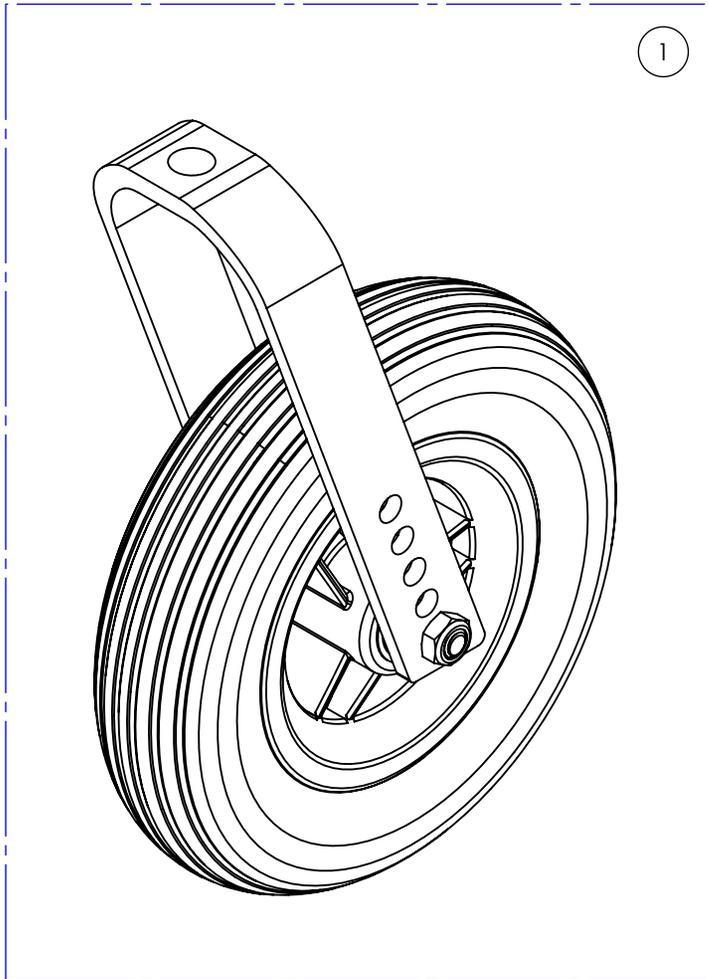


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001132A\_9001134A**  
**PALETTE - COMPOSITE, DROITE**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                             | 9001132 | 9001133 | 9001134 |
|----------|-------------|---|---------|---------|---------|
| 1        | 0031275A-00 | PALETTE COMPOSITE 6x4po, DROITE         | 1       | -       | -       |
| 2        | 0031277A-00 | PALETTE COMPOSITE 7x4po, DROITE         | -       | 1       | -       |
| 3        | 0031279A-00 | PALETTE COMPOSITE 8x4po, DROITE         | -       | -       | 1       |
| 4        | 0099510A-00 | ÉCROU AUTOBLOQUANT MINCE 1/4-20         | 1       | 1       | 1       |
| 5        | 0090670A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M6x1x58mm L, 24mm FILET | 1       | 1       | 1       |
| 6        | 0031052A-00 | RONDELLE DOMÉE PLASTIQUE 1/4            | 2       | 2       | 2       |

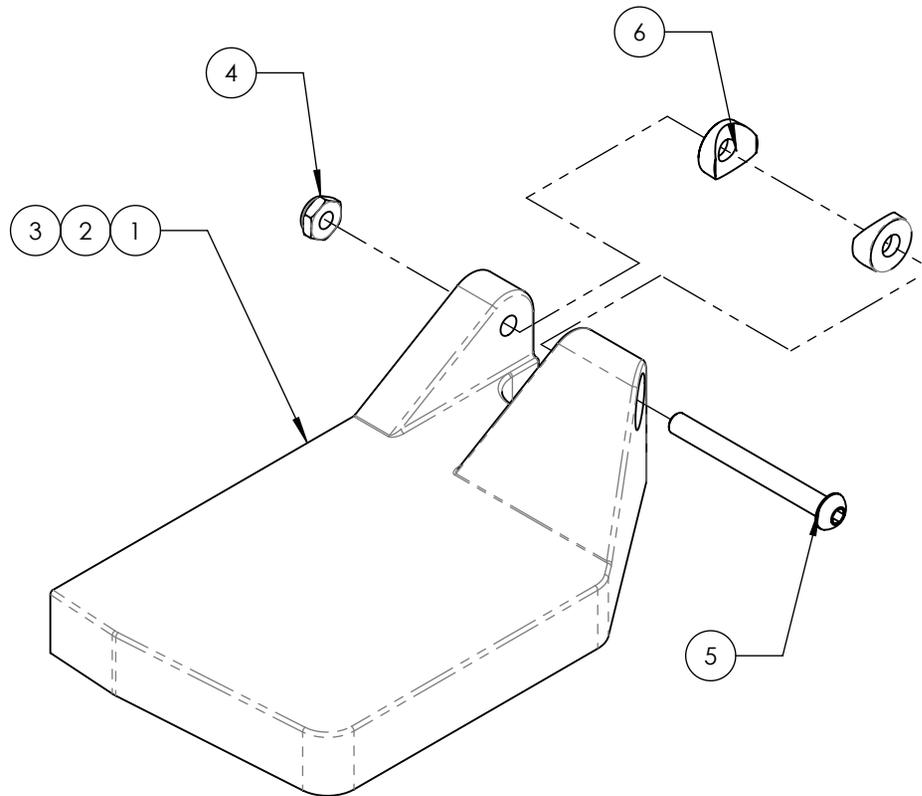


9001132A-00  
 PALETTE - COMPOSITE, DROITE, 6x4po

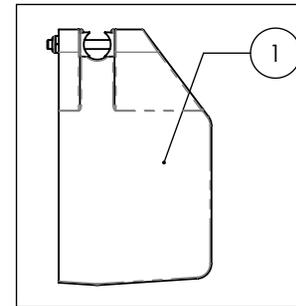

9001133A-00  
 PALETTE - COMPOSITE, DROITE, 7x4po

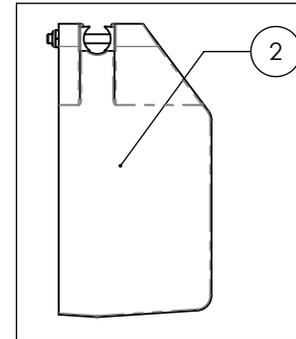


9001134A-00  
 PALETTE - COMPOSITE, DROITE, 8x4po

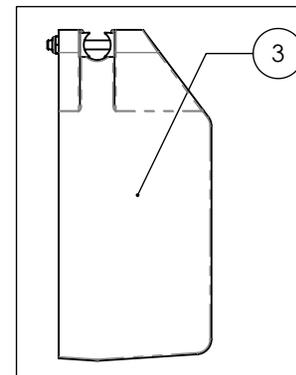


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001135A\_9001137A**  
**PALETTE - COMPOSITE, GAUCHE**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                             | 9001135 | 9001136 | 9001137 |
|----------|-------------|---|---------|---------|---------|
| 1        | 0031276A-00 | PALETTE COMPOSITE 6x4po, GAUCHE         | 1       | -       | -       |
| 2        | 0031278A-00 | PALETTE COMPOSITE 7x4po, GAUCHE         | -       | 1       | -       |
| 3        | 0031280A-00 | PALETTE COMPOSITE 8x4po, GAUCHE         | -       | -       | 1       |
| 4        | 0099510A-00 | ÉCROU AUTOBLOQUANT MINCE 1/4-20         | 1       | 1       | 1       |
| 5        | 0090670A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M6x1x58mm L, 24mm FILET | 1       | 1       | 1       |
| 6        | 0031052A-00 | RONDELLE DOMÉE PLASTIQUE 1/4            | 2       | 2       | 2       |

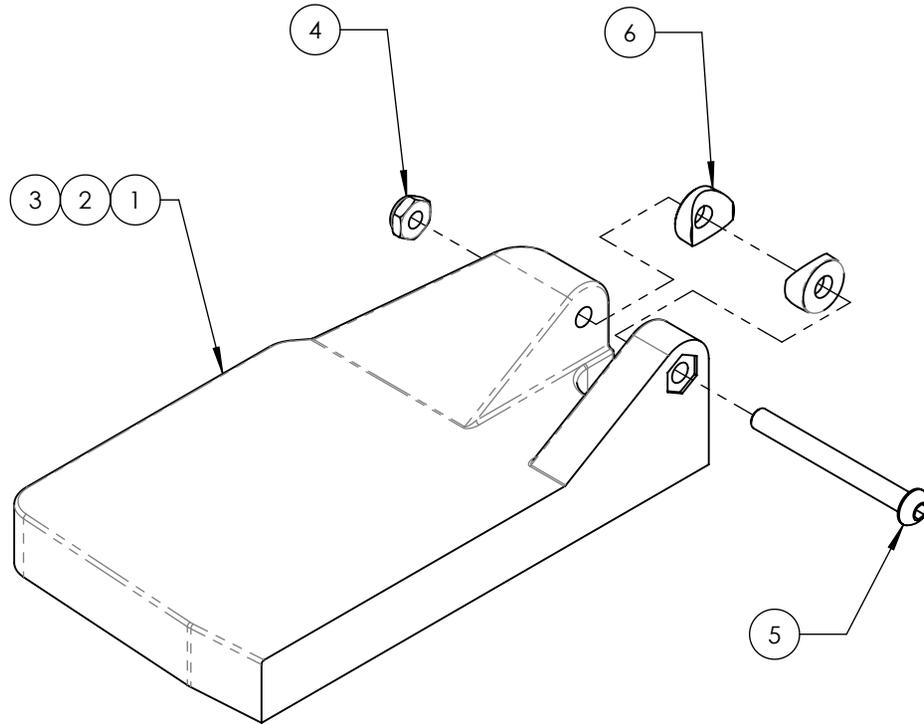


9001135A-00  
 PALETTE - COMPOSITE, GAUCHE, 6x4po

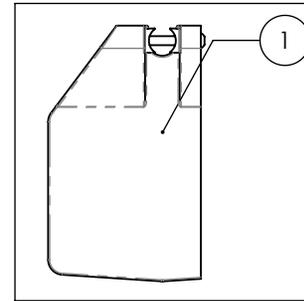

9001136A-00  
 PALETTE - COMPOSITE, GAUCHE, 7x4po

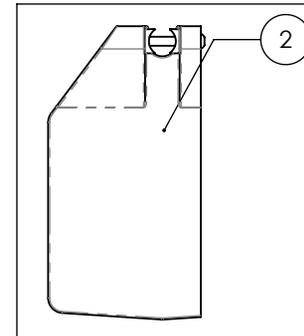





9001137A-00  
 PALETTE - COMPOSITE, GAUCHE, 8x4po

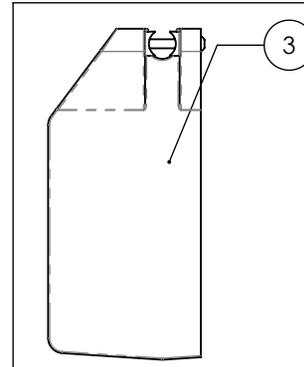

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001318A-00**  
**MONTAGE HAUT - EXTENSION AVEC BAGUES**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                          | Default |
|----------|-------------|--------------------------------------|---------|
| 1        | 0031638A-00 | EXTENSION DROITE MONTAGE HAUT - ASSY | 1       |
| 2        | 0041703B-00 | BAGUE 0.75-1 po - ASSY               | 2       |

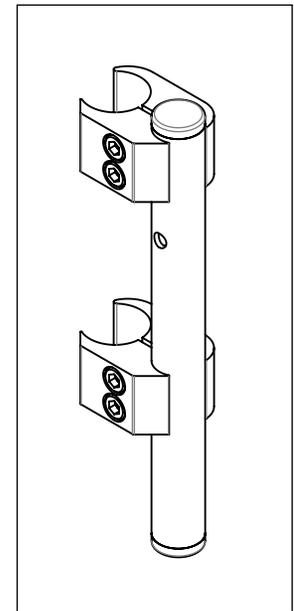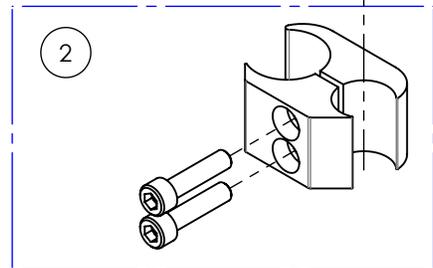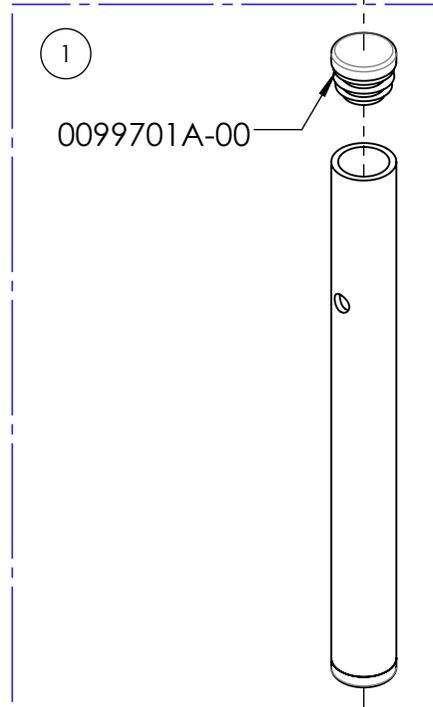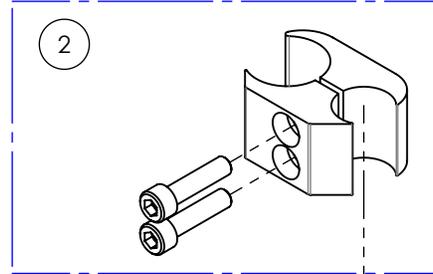

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


**9001328A\_9001329A**

**APPUI-PIED V2, DROITE, 60° & 70°, EXT LONGUE, NOIR**

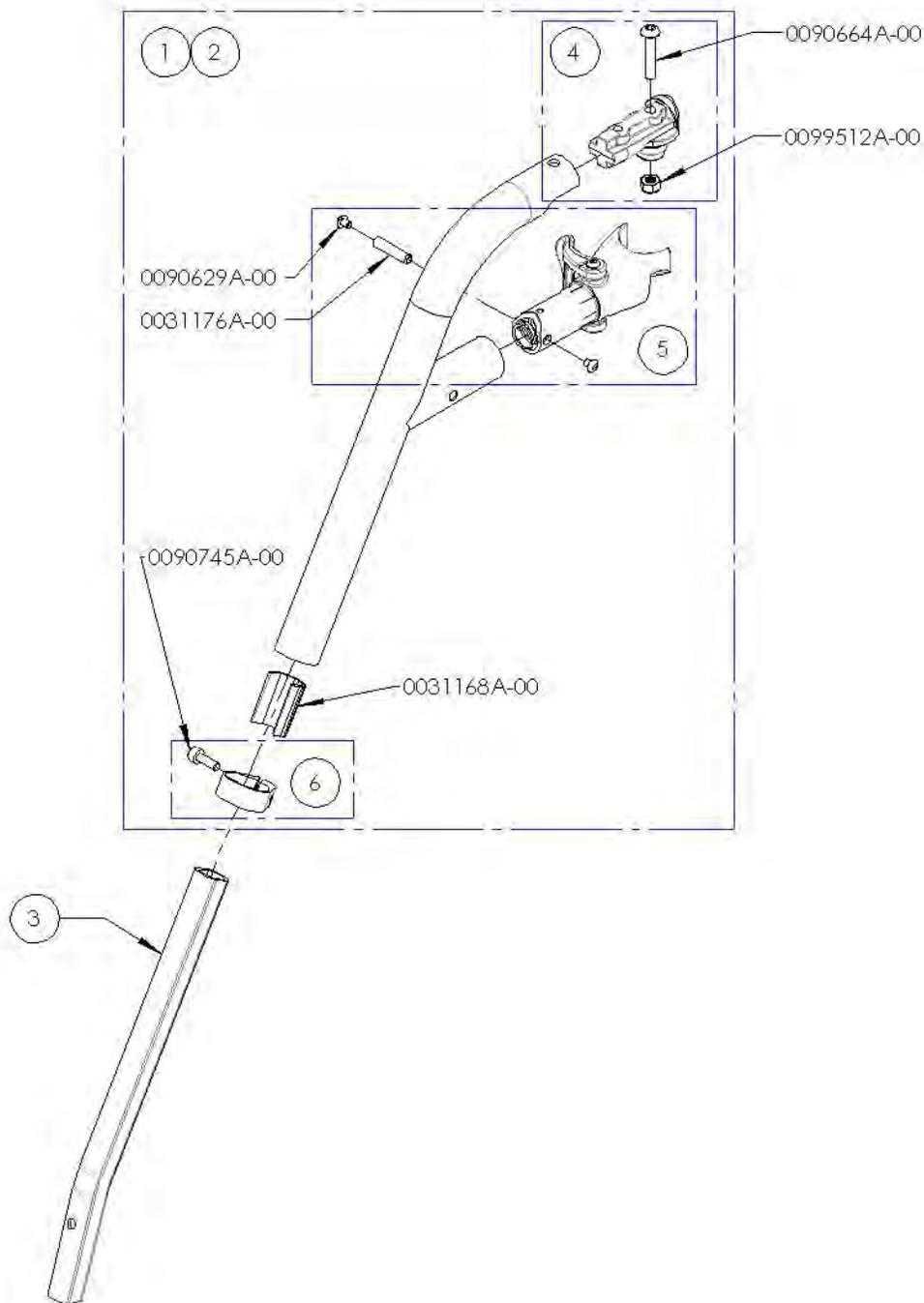


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                       | 9001328A-00 | 9001329A-00 | EXTRA |
|----------|-------------|---|-------------|-------------|-------|
| 1        | 0031543B-00 | APPUI PIED V2 60 DEG, DROITE - ASSEMBLAGE         | 1           | -           | -     |
| 2        | 0031545B-00 | APPUI PIED V2 70 DEG, DROITE - ASSEMBLAGE         | -           | 1           | -     |
| 3        | 0031169A-00 | EXTENSION APPUI PIED V2                           | 1           | 1           | -     |
| 4        | 0031551B-00 | PIVOT APPUI PIED V2 - ASSEMBLAGE                  | -           | -           | 1     |
| 5        | 0031550A-00 | BATI APPUI PIED V2 DROIT - ASSEMBLAGE             | -           | -           | 1     |
| 6        | 0031552A-00 | BAGUE EXTENSION DROITE APPUI PIED V2 - ASSEMBLAGE | -           | -           | 1     |

9001328A-00 -  
APPUI-PIED V2, DROITE, 60°, EXT.  
LONGUE - NOIR

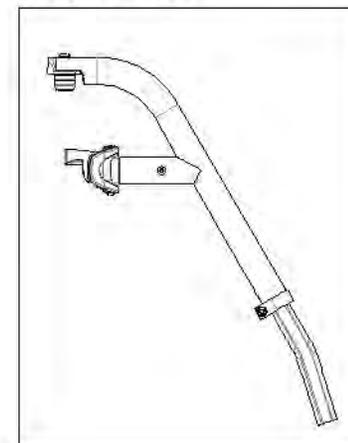


9001329A-00 -  
APPUI-PIED V2, DROITE, 70°, EXT.  
LONGUE - NOIR

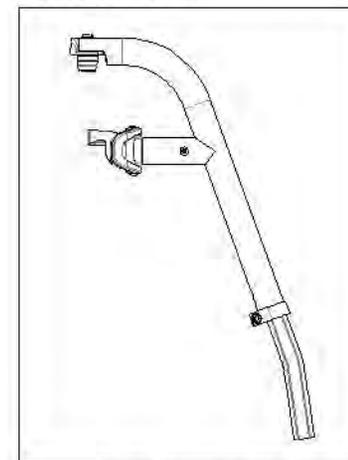


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001330A & 9003081A**  
**APPUI-PIED V2, DROITE, 80° & 90°, EXT COURTE, NOIR**


| No. ITEM | No. PIECE   | DESCRIPTION                                       | 9001330A-00 | 9003081A-00 | EXTRA |
|----------|-------------|---|-------------|-------------|-------|
| 1        | 0031547B-00 | APPUI PIED V2 90 DEG, DROITE - ASSEMBLAGE         | 1           | -           | -     |
| 2        | 0031617B-00 | APPUI PIED V2 80 DEG, DROITE - ASSEMBLAGE         | -           | 1           | -     |
| 3        | 0031198A-00 | EXTENSION 90 DEG APPUI PIED V2                    | 1           | 1           | -     |
| 4        | 0031551B-00 | PIVOT APPUI PIED V2 - ASSEMBLAGE                  | -           | -           | 1     |
| 5        | 0031550A-00 | BATI APPUI PIED V2 DROIT - ASSEMBLAGE             | -           | -           | 1     |
| 6        | 0031552A-00 | BAGUE EXTENSION DROITE APPUI PIED V2 - ASSEMBLAGE | -           | -           | 1     |

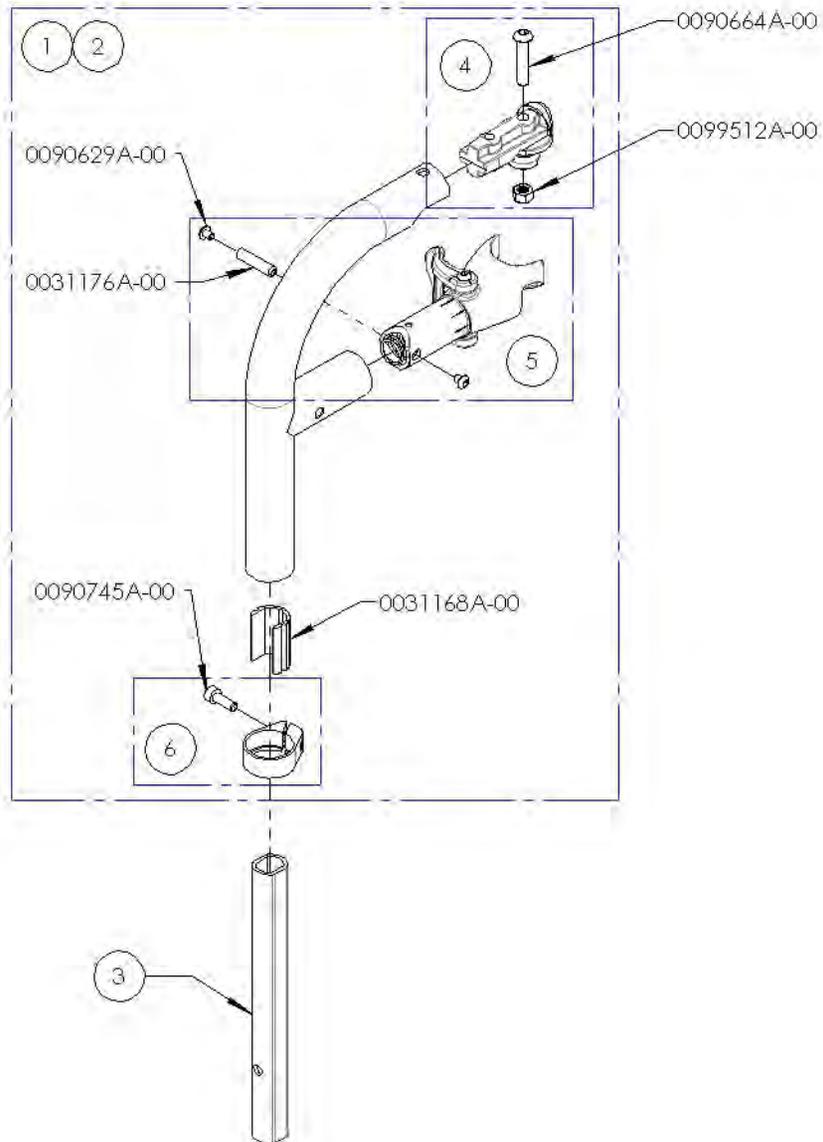

9001330A-00  
 APPUI-PIED V2, DROITE, 90°, EXT.  
 COURTE - NOIR

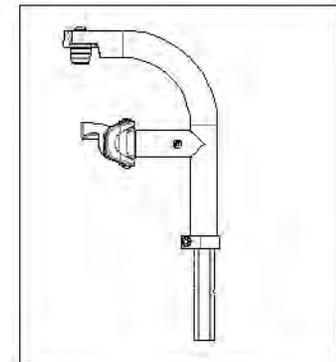


9003081A-00  
 APPUI-PIED V2, DROITE, 80°, EXT.  
 COURTE - NOIR

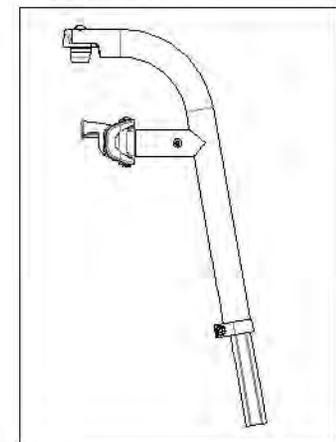

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


**9001331A\_9001332A**

**APPUI-PIED V2, GAUCHE, 60° & 70°, EXT LONGUE, NOIR**

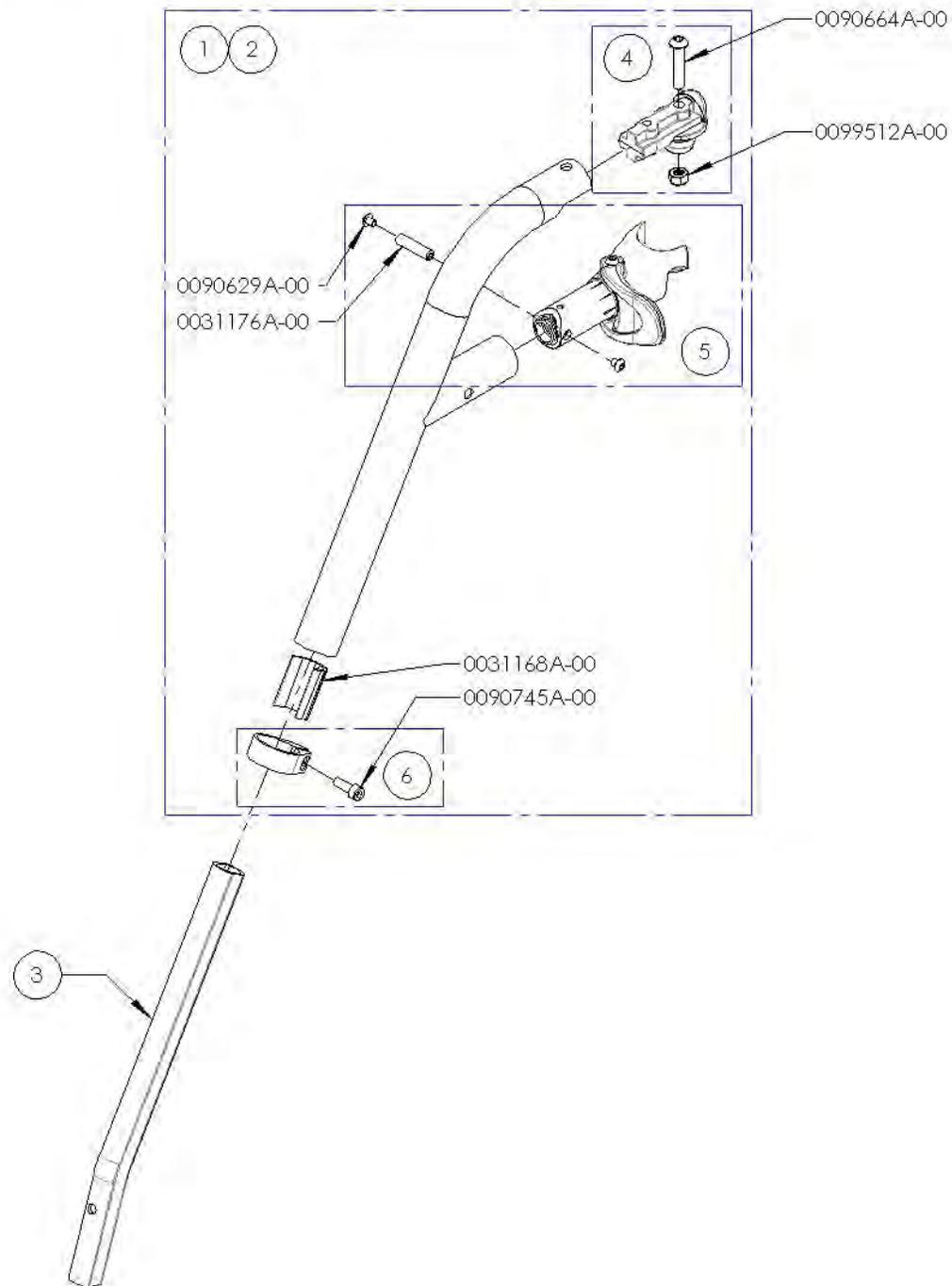


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                       | 9001331A-00 | 9001332A-00 | EXTRA |
|----------|-------------|---|-------------|-------------|-------|
| 1        | 0031544B-00 | APPUI-PIED V2 60 DEG, GAUCHE - ASSEMBLAGE         | 1           | -           | -     |
| 2        | 0031546B-00 | APPUI-PIED V2 70 DEG, GAUCHE - ASSEMBLAGE         | -           | 1           | -     |
| 3        | 0031169A-00 | EXTENSION APPUI-PIED V2                           | 1           | 1           | -     |
| 4        | 0031551B-00 | PIVOT APPUI-PIED V2 - ASSEMBLAGE                  | -           | -           | 1     |
| 5        | 0031549A-00 | BÂTI APPUI-PIED V2 GAUCHE - ASSEMBLAGE            | -           | -           | 1     |
| 6        | 0031553A-00 | BAGUE EXTENSION GAUCHE APPUI-PIED V2 - ASSEMBLAGE | -           | -           | 1     |

9001331A-00 - APPUI-PIED V2, GAUCHE, 60°, EXT. LONGUE - NOIR

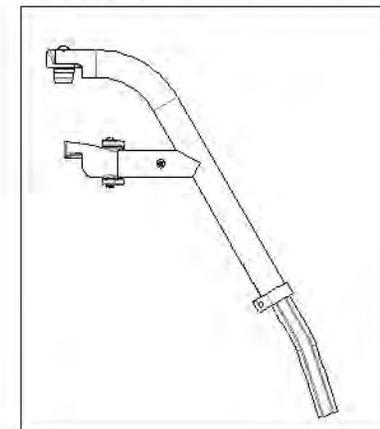


9001332A-00 - APPUI-PIED V2, GAUCHE, 70°, EXT. LONGUE - NOIR

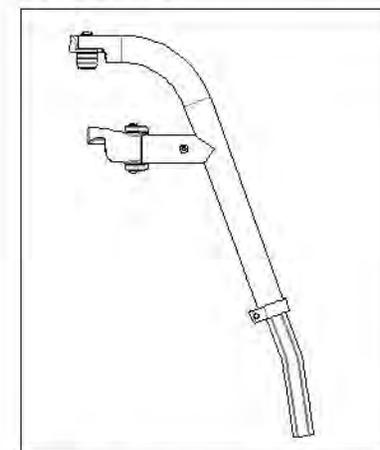


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001333A & 9003082A**  
**APPUI-PIED V2, GAUCHE, 80° & 90°, EXT COURTE, NOIR**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                       | 9001333A-00 | 9003082A-00 | EXTRA |
|----------|-------------|---|-------------|-------------|-------|
| 1        | 0031548B-00 | APPUI PIED V2 90 DEG, GAUCHE - ASSEMBLAGE         | 1           | -           | -     |
| 2        | 0031618B-00 | APPUI PIED V2 80 DEG, GAUCHE - ASSEMBLAGE         | -           | 1           | -     |
| 3        | 0031198A-00 | EXTENSION 90 DEG APPUI PIED V2                    | 1           | 1           | -     |
| 4        | 0031551B-00 | PIVOT APPUI PIED V2 - ASSEMBLAGE                  | -           | -           | 1     |
| 5        | 0031549A-00 | BATI APPUI PIED V2 GAUCHE - ASSEMBLAGE            | -           | -           | 1     |
| 6        | 0031553A-00 | BAGUE EXTENSION GAUCHE APPUI PIED V2 - ASSEMBLAGE | -           | -           | 1     |

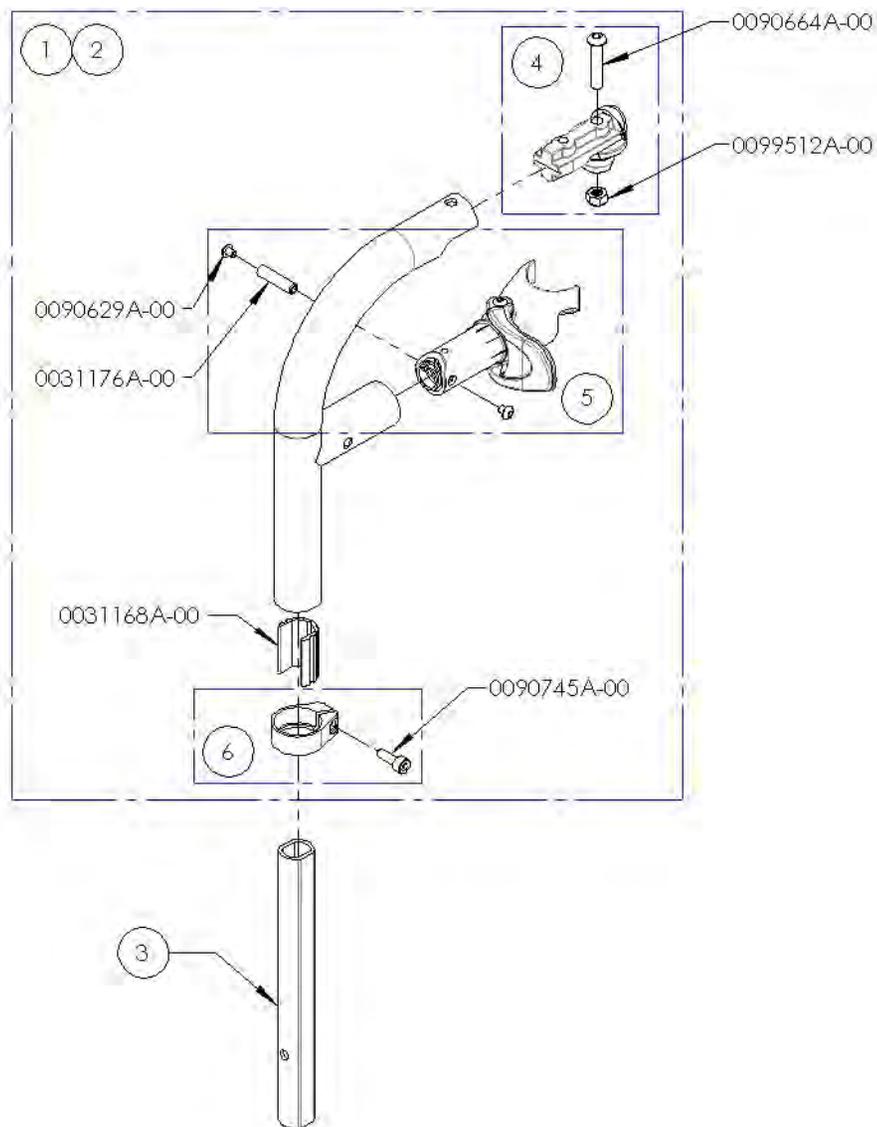

9001333A-00  
 APPUI-PIED V2, GAUCHE, 90°,  
 EXT. COURTE - NOIR

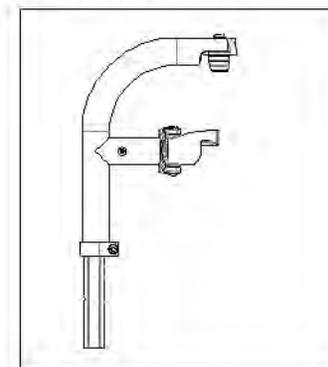


9003082A-00  
 APPUI-PIED V2, GAUCHE, 80°,  
 EXT. COURTE - NOIR

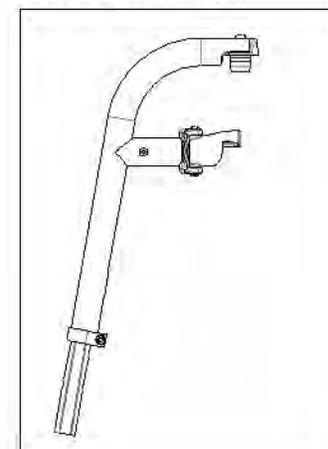


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001343A**  
**MONTAGE FRONTAL - PIVOT INT & EXT DROITE**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                     | Q.TÉ |
|----------|-------------|---|------|
| 1        | 9010371A-00 | MONTAGE FRONTAL - COMP, PIVOT INT & EXT, DROITE | 1    |
| 1.1      | 0031550A-00 | BATI APPUI PIED V2 DROIT - ASSEMBLAGE           | 1    |
| 1.2      | 0031551B-00 | PIVOT APPUI PIED V2 - ASSEMBLAGE                | 1    |

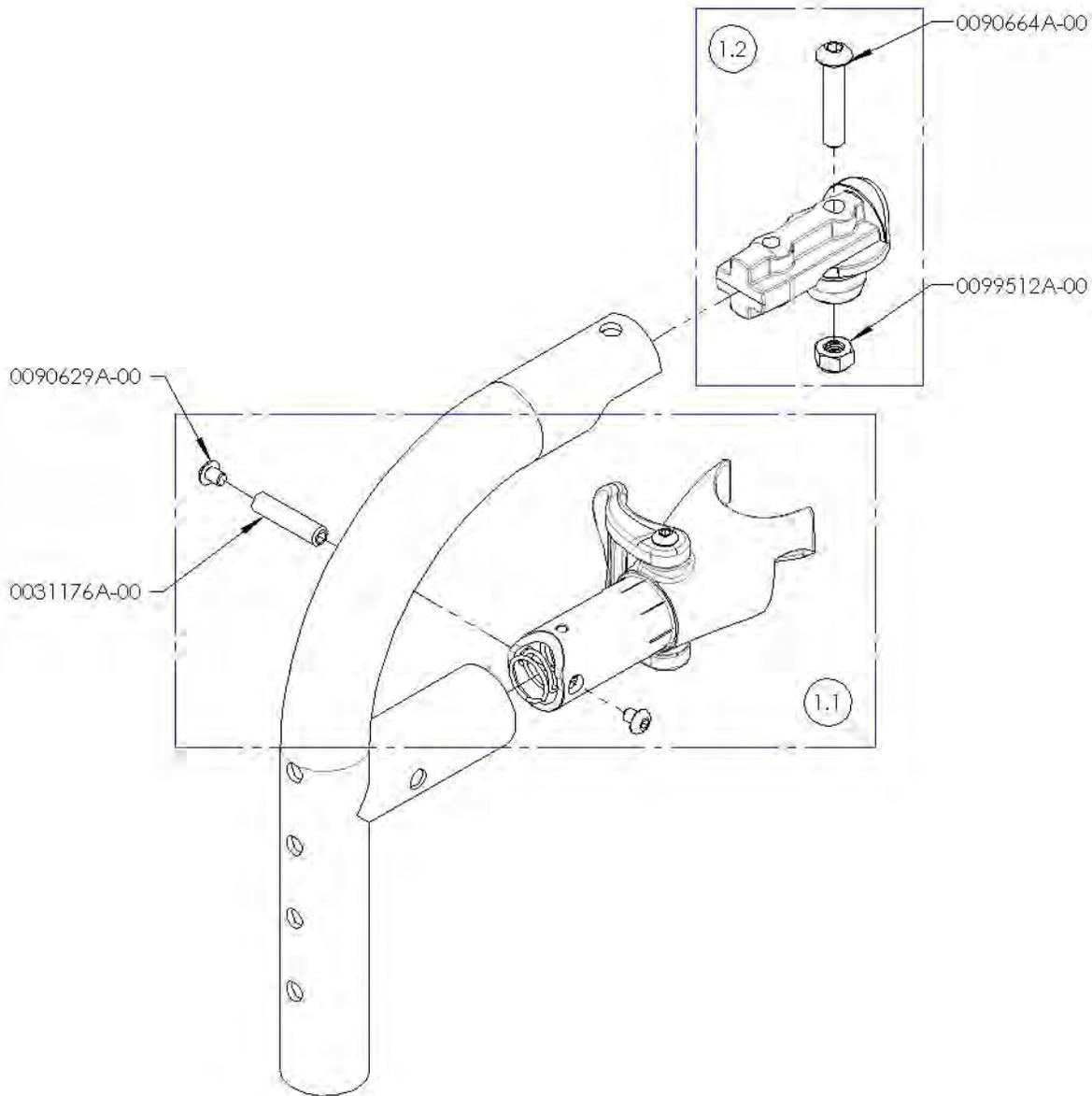

9001343A-00  
MONTAGE FRONTAL - PIVOT INT & EXT DROITE (NOIR)

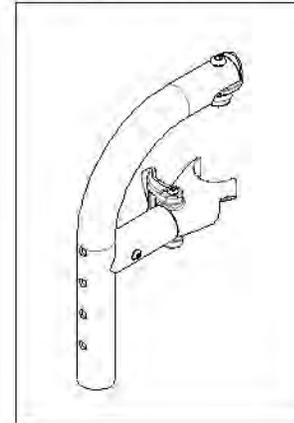


9001343A-01  
MONTAGE FRONTAL - PIVOT INT & EXT DROITE (COULEUR)

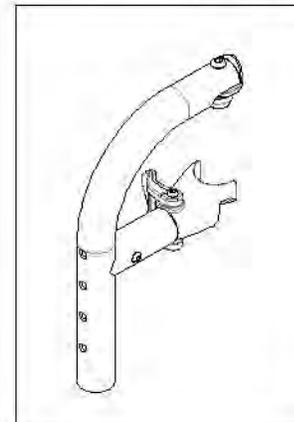


**9001344A**  
**MONTAGE FRONTAL - PIVOT INT & EXT GAUCHE**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                     | QTE |
|----------|-------------|---|-----|
| 1        | 9010372A-00 | MONTAGE FRONTAL - COMP. PIVOT INT & EXT. GAUCHE | 1   |
| 1.1      | 0031549A-00 | BATI APPLI PIED V2 GAUCHE - ASSEMBLAGE          | 1   |
| 1.2      | 0031551B-00 | PIVOT APPLI PIED V2 - ASSEMBLAGE                | 1   |

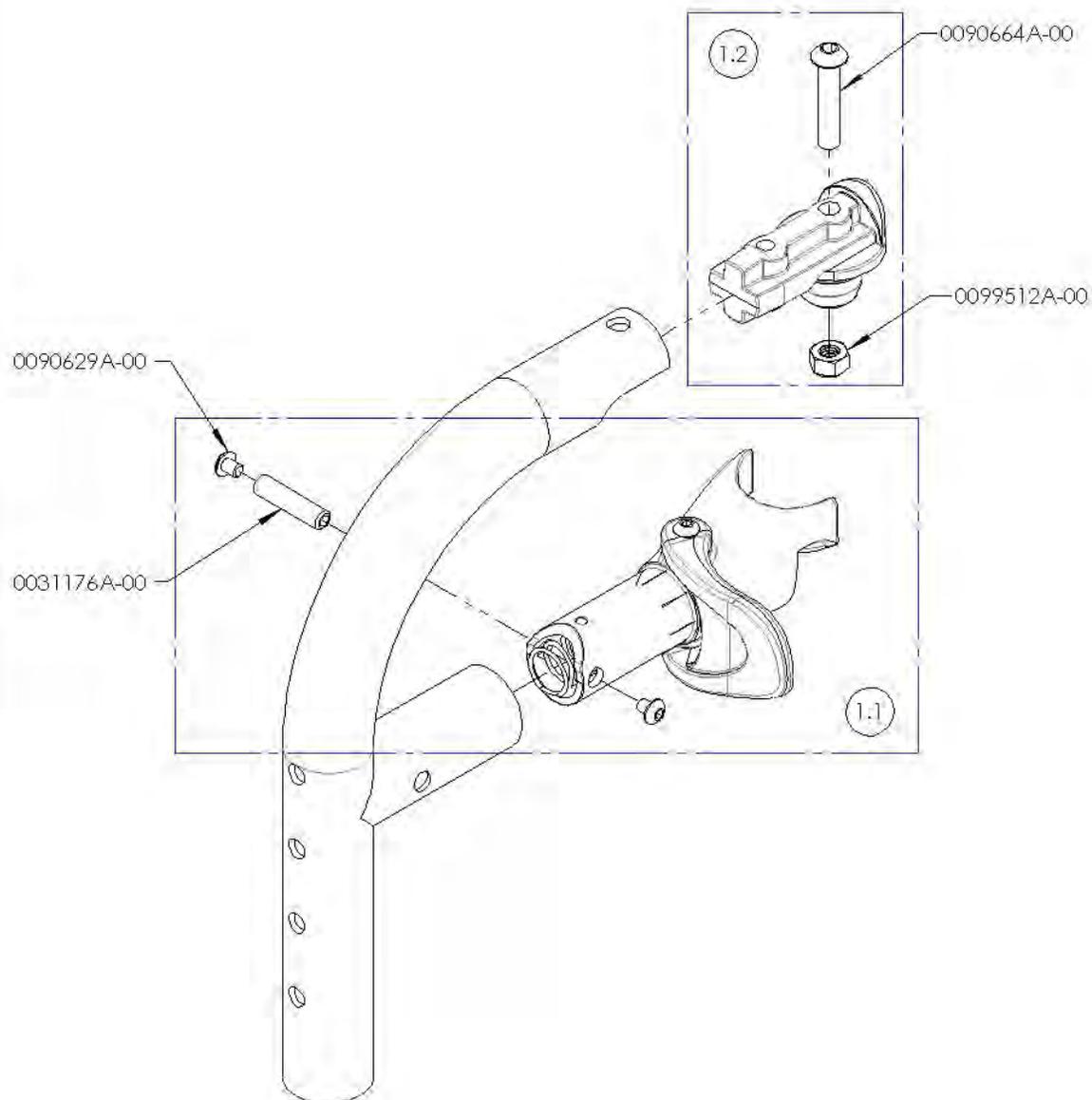

9001344A-00  
MONTAGE FRONTAL - PIVOT INT & EXT GAUCHE (NOIR)

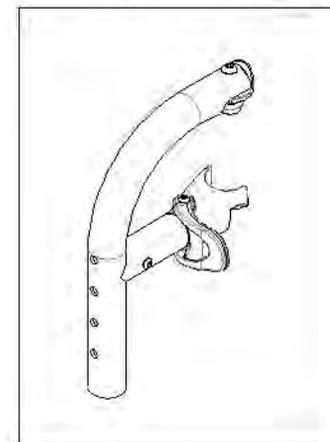


9001344A-01  
MONTAGE FRONTAL - PIVOT INT & EXT GAUCHE (COULEUR)

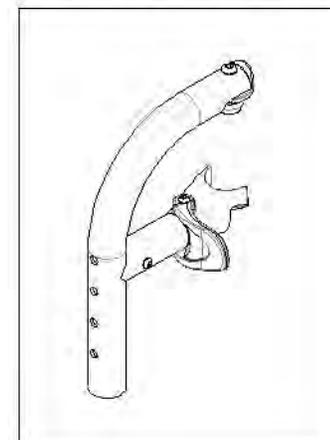


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001347A-00**  
**MONTAGE FRONTAL - SANS EXTENSION**

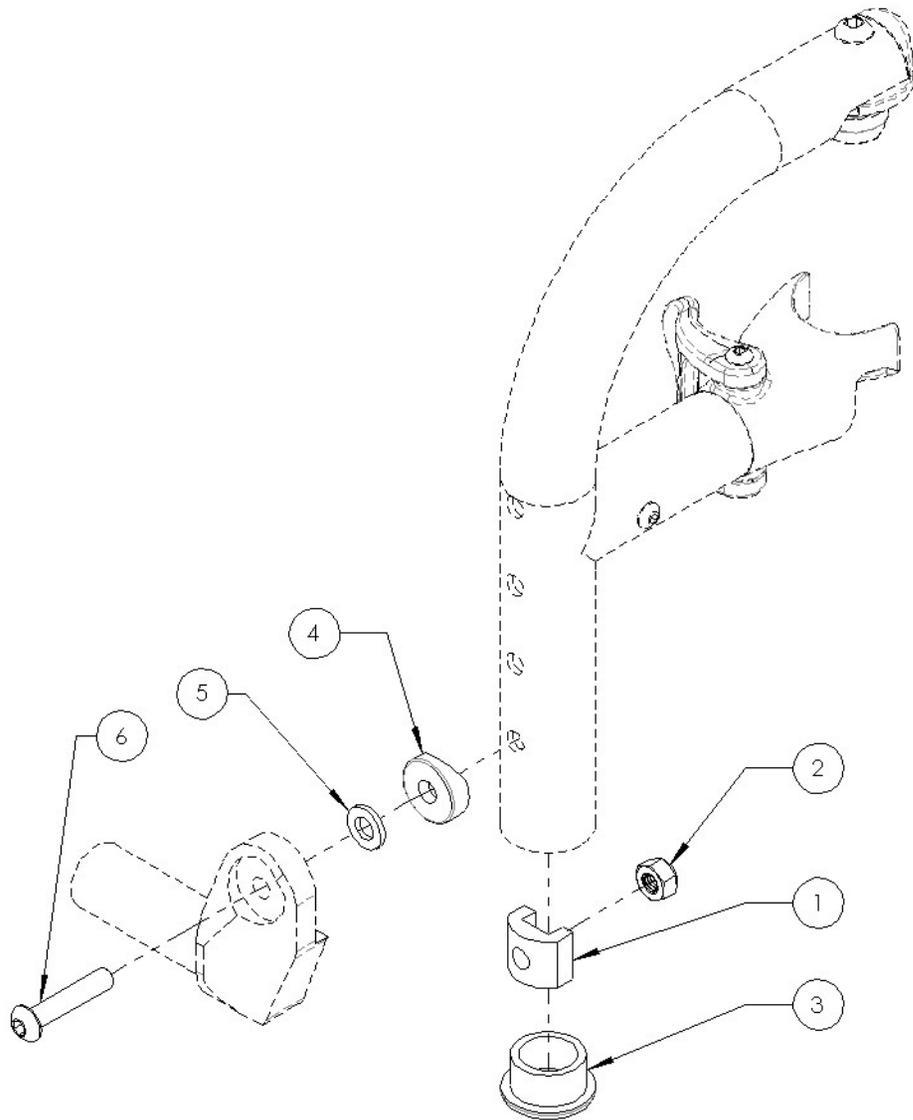



| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                              | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 1        | 0031213A-00 | SUPPORT ÉCROUX APPUI PIED MONTAGE DIRECT | 1   |
| 2        | 0099512A-00 | ÉCROU AUTOBLOQUANT M6x1                  | 1   |
| 3        | 0099702A-00 | BOUCHON 1 p o (ALU)                      | 1   |
| 4        | 0033068A-00 | RONDELLE DOMÉE 1/4POX1-1/4p o PLASTIQUE  | 1   |
| 5        | 0099562A-00 | RONDELLE 1/4p o                          | 1   |
| 6        | 0090664A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M6x1x30mm L              | 1   |

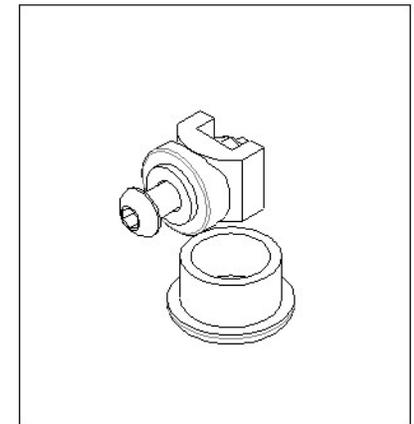

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001348A-00**  
**MONTAGE FRONTAL - EXTENSION, COURTE**



| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                  | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 1        | 0031211A-00 | EXTENSION COURTE STRUCTURE MONTAGE DIRECT V2 | 1   |
| 2        | 0099512A-00 | ÉCROU AUTOBLOQUANT M6x1                      | 2   |
| 3        | 0099562A-00 | RONDELLE 1/4p                                | 2   |
| 4        | 0033068A-00 | RONDELLE DOMÉE 1/4POX1-1/4p                  | 4   |
| 5        | 0090669A-00 | VISTÊTE BOMBÉE M6x1 x55mm L, 24mm FILET      | 1   |
| 6        | 0090666A-00 | VISTÊTE BOMBÉE M6x1 X 40mm L, 24mm FILET     | 1   |
| 7        | 0099560A-00 | RONDELLE 1/4p, 17/64 ID, 1/2 OD, .032 ÉPAIS  | 2   |

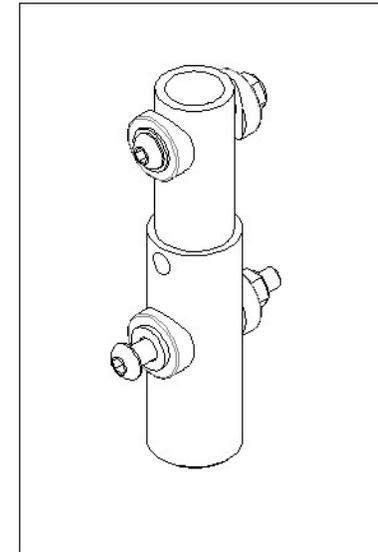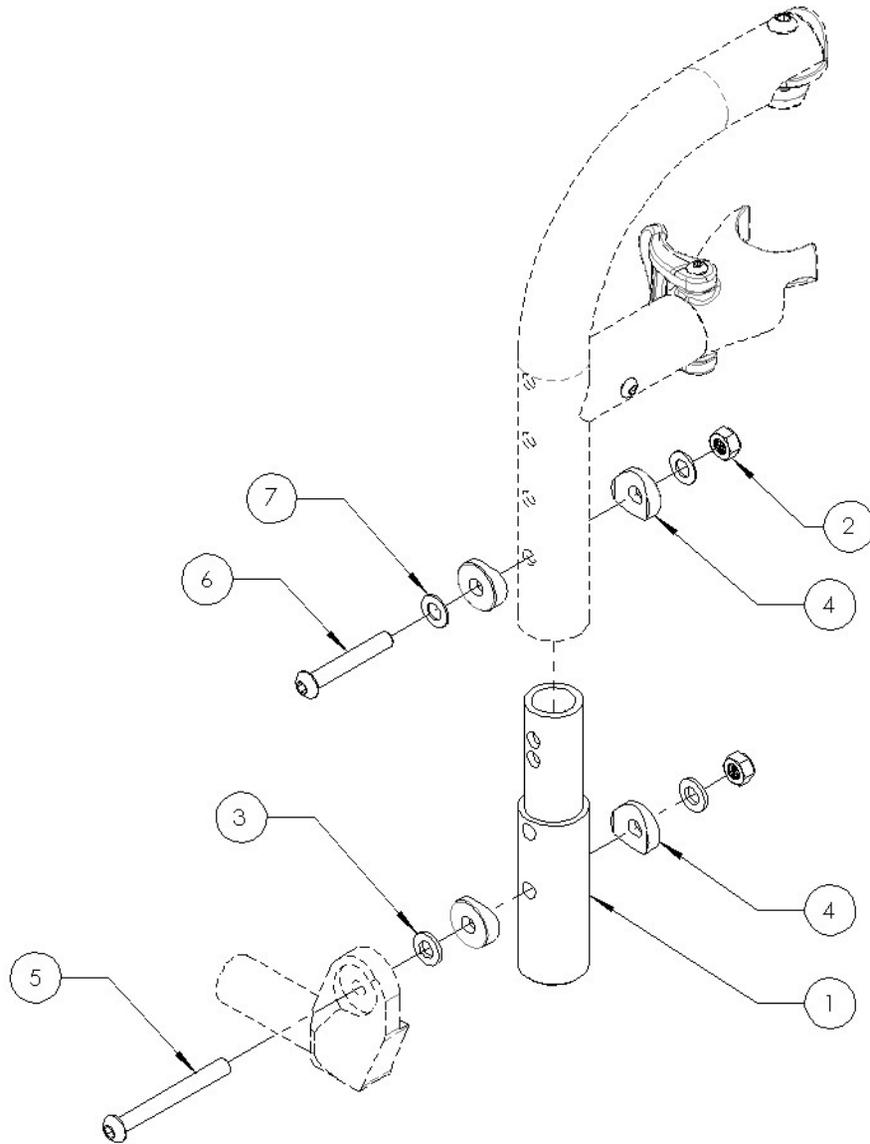

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001349A-00**  
**MONTAGE FRONTAL - EXTENSION, MOYENNE**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                   | QTÉ |
|----------|-------------|---|-----|
| 1        | 0031219A-00 | EXTENSION MOYENNE STRUCTURE MONTAGE DIRECT V2 | 1   |
| 2        | 0099512A-00 | ÉCROU AUTOBLOQUANT M6x1                       | 2   |
| 3        | 0099562A-00 | RONDELLE 1/4p ø                               | 2   |
| 4        | 0033068A-00 | RONDELLE DOMÉE 1/4POX1-1/4p ø PLASTIQUE       | 4   |
| 5        | 0090669A-00 | VISTÊTE BOMBÉE M6x1 x55mm L, 24mm FILET       | 1   |
| 6        | 0090666A-00 | VISTÊTE BOMBÉE M6x1 x40mm L, 24mm FILET       | 1   |
| 7        | 0099560A-00 | RONDELLE 1/4p ø, 17/64 ID, 1/2 OD, .032 ÉPAIS | 2   |

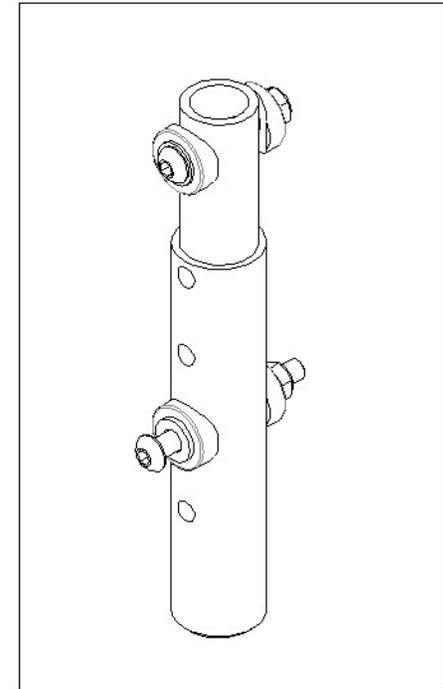
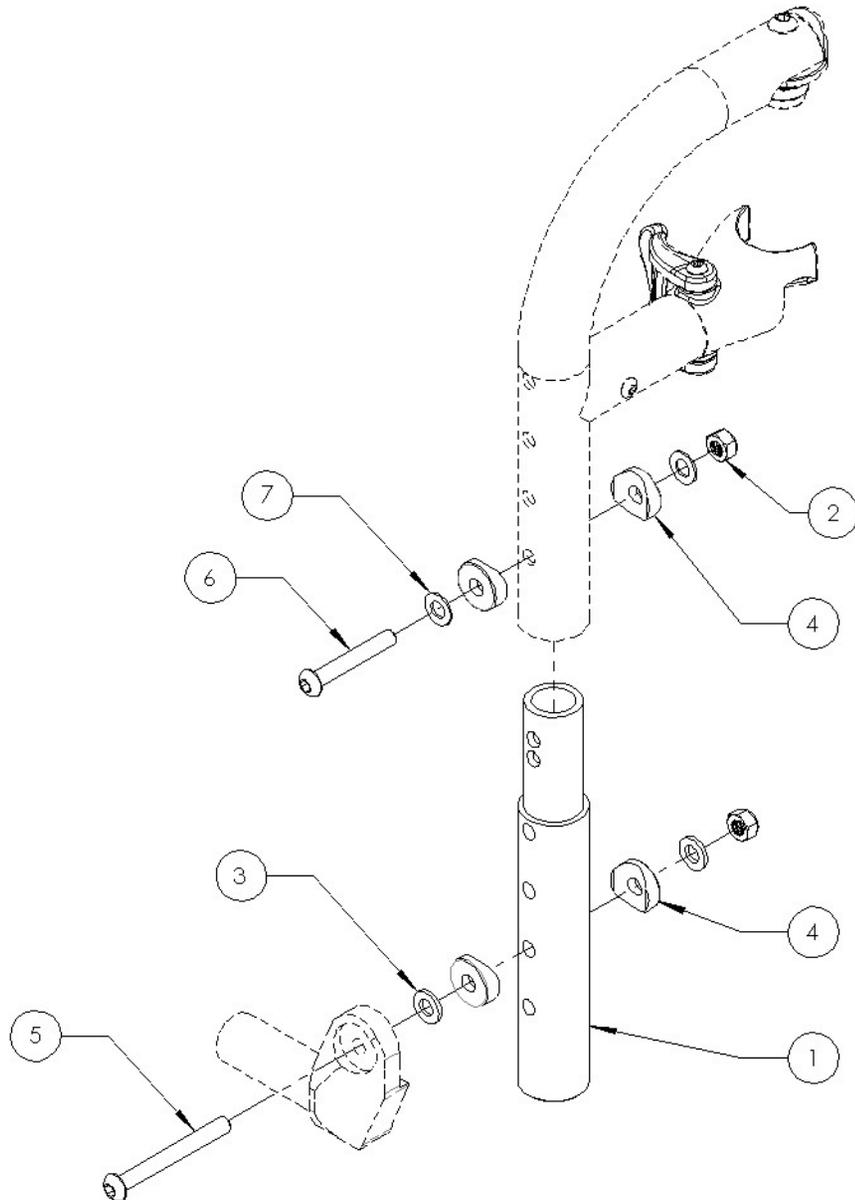


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


**9001354A\_9001355A**

**APPUI-JAMBE ÉLÉ - PIVOT INT & EXT, DROITE**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                              | 9001354A -00 | 9001355A -00 | EXTRA |
|----------|-------------|--|--------------|--------------|-------|
| 1        | 0031564A-00 | APPUI PIED ELEVATEUR V2 DROITE           | 1            | 1            | -     |
| 2        | 0031140A-00 | COUSSIN APPUI-MOLLET ELR 14-16pø, DROITE | 1            | -            | -     |
| 3        | 0031142A-00 | COUSSIN APPUI-MOLLET ELR 17-22pø, DROITE | -            | 1            | -     |
| 4        | 0031551B-00 | PIVOT APPUI PIED V2 - ASSEMBLAGE         | -            | -            | 1     |
| 5        | 0031550A-00 | BATI APPUI PIED V2 DROIT - ASSEMBLAGE    | -            | -            | 1     |
| 6        | 0031158A-00 | SUPPORT DE COUSSIN POUR APPUI-MOLLET     | -            | -            | 1     |

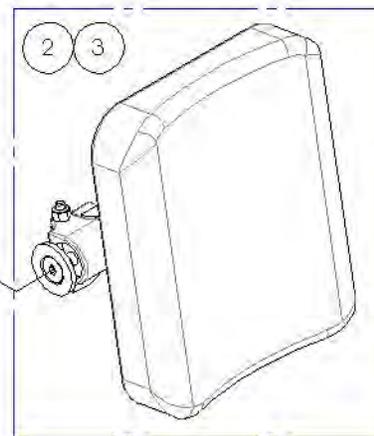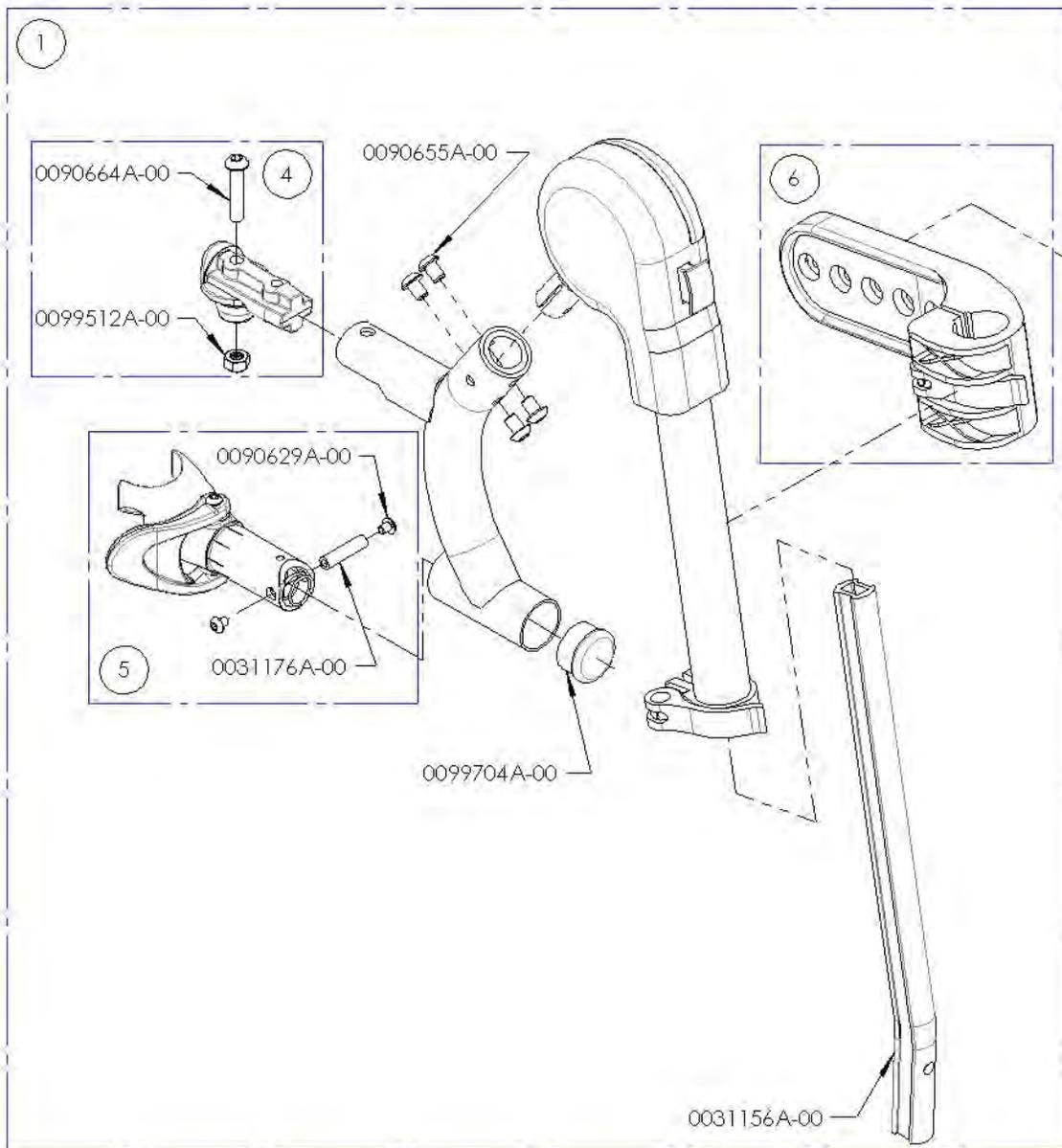

9001354A-00  
APPUI-JAMBE ÉLÉ - PIVOT INT & EXT, DROITE, MOYEN

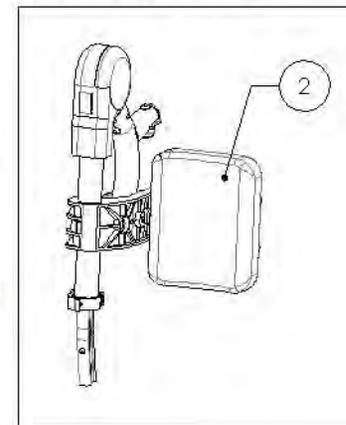



9001355A-00  
APPUI-JAMBE ÉLÉ - PIVOT INT & EXT, DROITE, GRAND

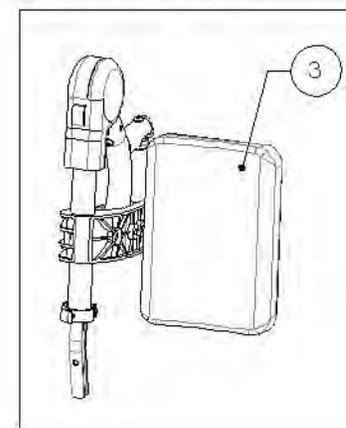


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001356A\_9001357A**  
**APPUI-JAMBE ÉLÉ - PIVOT INT & EXT, GAUCHE**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                              | 9001356A-00 | 9001357A-00 | EXTRA |
|----------|-------------|--|-------------|-------------|-------|
| 1        | 0031565A-00 | APPUI PIED ELEVATEUR V2 GAUCHE           | 1           | 1           | -     |
| 2        | 0031141A-00 | COUSSIN APPUI-MOLLET ELR 14-16pø, GAUCHE | 1           | -           | -     |
| 3        | 0031143A-00 | COUSSIN APPUI-MOLLET ELR 17-22pø, GAUCHE | -           | 1           | -     |
| 4        | 0031551B-00 | PIVOT APPUI PIED V2 - ASSEMBLAGE         | -           | -           | 1     |
| 5        | 0031549A-00 | BATI APPUI PIED V2 GAUCHE- ASSEMBLAGE    | -           | -           | 1     |
| 6        | 0031158A-00 | SUPPORT DE COUSSIN POUR APPUI-MOLLET     | -           | -           | 1     |

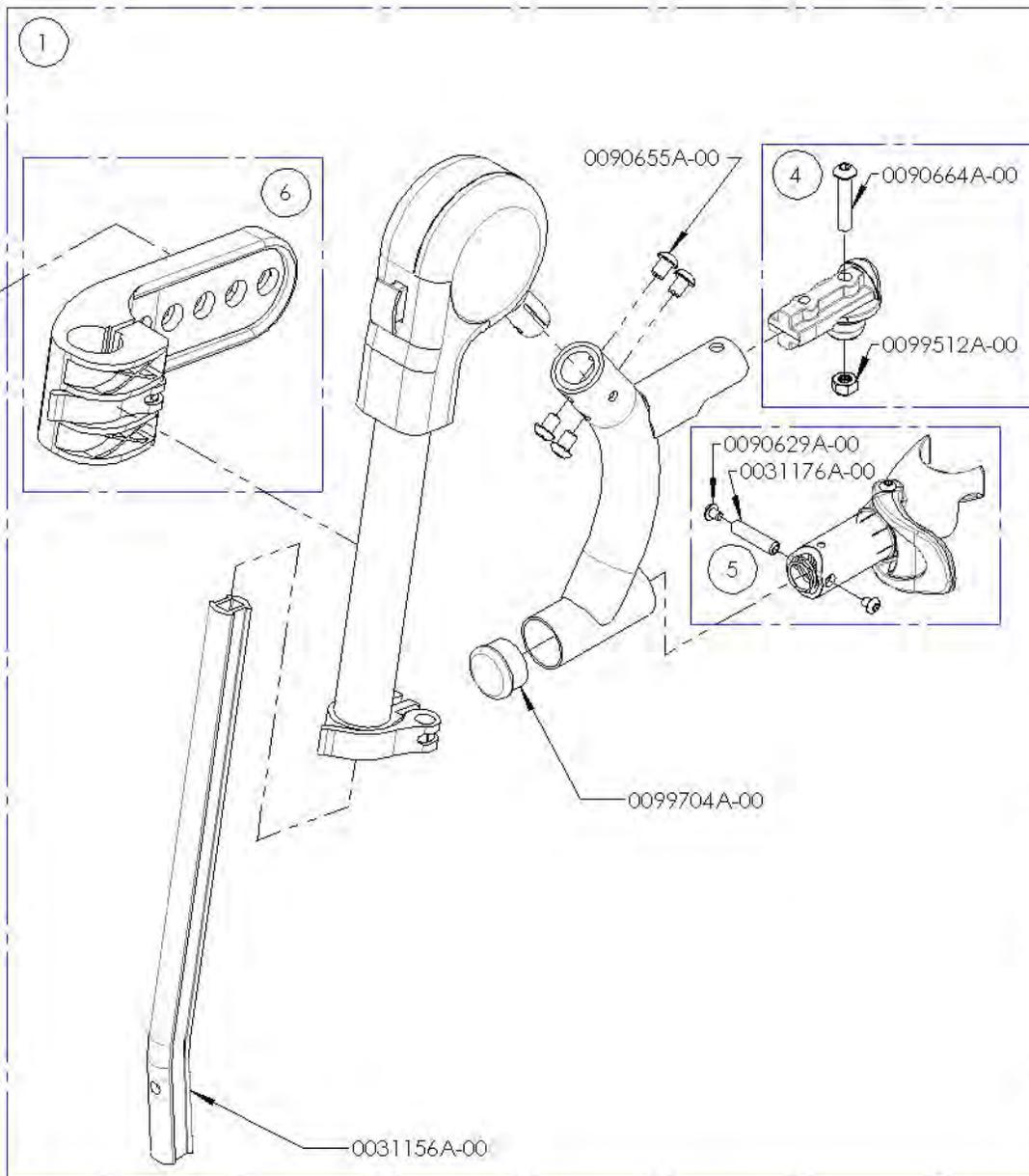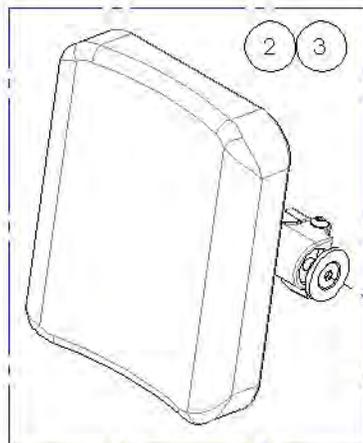

9001356A-00  
 APPUI-JAMBE ÉLÉ - PIVOT INT & EXT, GAUCHE, MOYEN

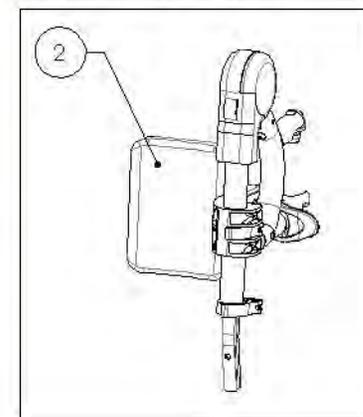


9001357A-00  
 APPUI-JAMBE ÉLÉ - PIVOT INT & EXT, GAUCHE, GRAND

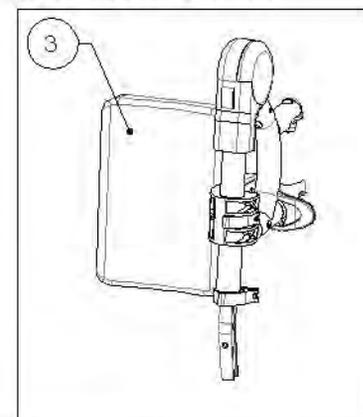


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001360A 9001362A**  
**Palette - Composite, 6 po de profondeur**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                    | 9001360 /QTE | 9001361 /QTE | 9001362 /QTE |
|----------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1        | 0031025A-00 | PALETTE COMPOSITE 6x6po - ASSY | 1            | -            | -            |
| 2        | 0031027A-00 | PALETTE COMPOSITE 8x6po - ASSY | -            | -            | 1            |
| 3        | 0031026A-00 | PALETTE COMPOSITE 7x6po - ASSY | -            | 1            | -            |

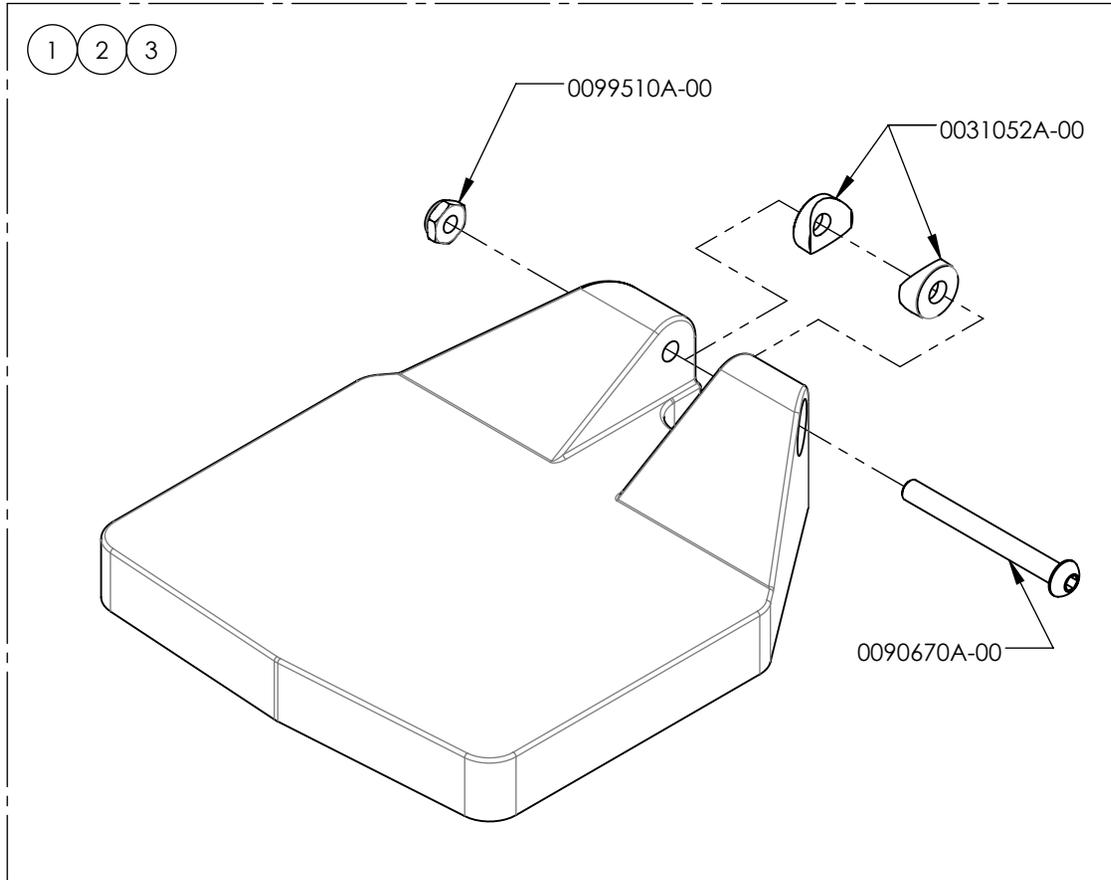


9001360A-00  
 Palette - Composite, 6x6po

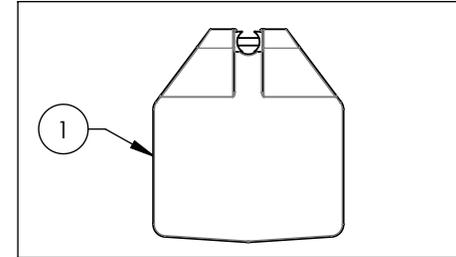

9001361A-00  
 Palette - Composite, 7x6po

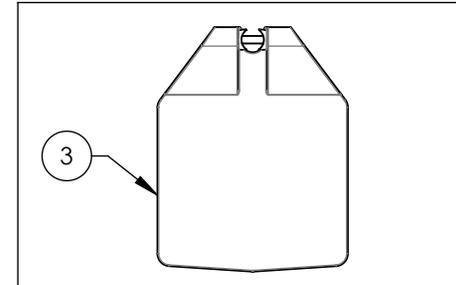

9001362A-00  
 Palette - Composite, 8x6po

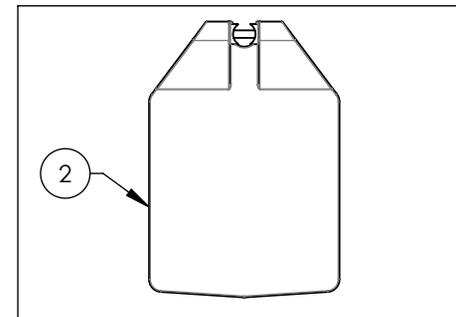


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


**9001363A\_9001366A**

**Palette - Aluminium, Newton réglable en angle, droite, 8 po de profondeur**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                     | 9001363 /QTE | 9001364 /QTE | 9001365 /QTE | 9001366 /QTE |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1        | 0031595A-00 | PALETTE NEWTON AJUST ALU 4.5x8po, DROITE - ASSY | 1            | -            | -            | -            |
| 2        | 0031597A-00 | PALETTE NEWTON AJUST ALU 5.5x8po, DROITE - ASSY | -            | 1            | -            | -            |
| 3        | 0031599A-00 | PALETTE NEWTON AJUST ALU 6.5x8po, DROITE - ASSY | -            | -            | 1            | -            |
| 4        | 0031601A-00 | PALETTE NEWTON AJUST ALU 7.5x8po, DROITE - ASSY | -            | -            | -            | 1            |

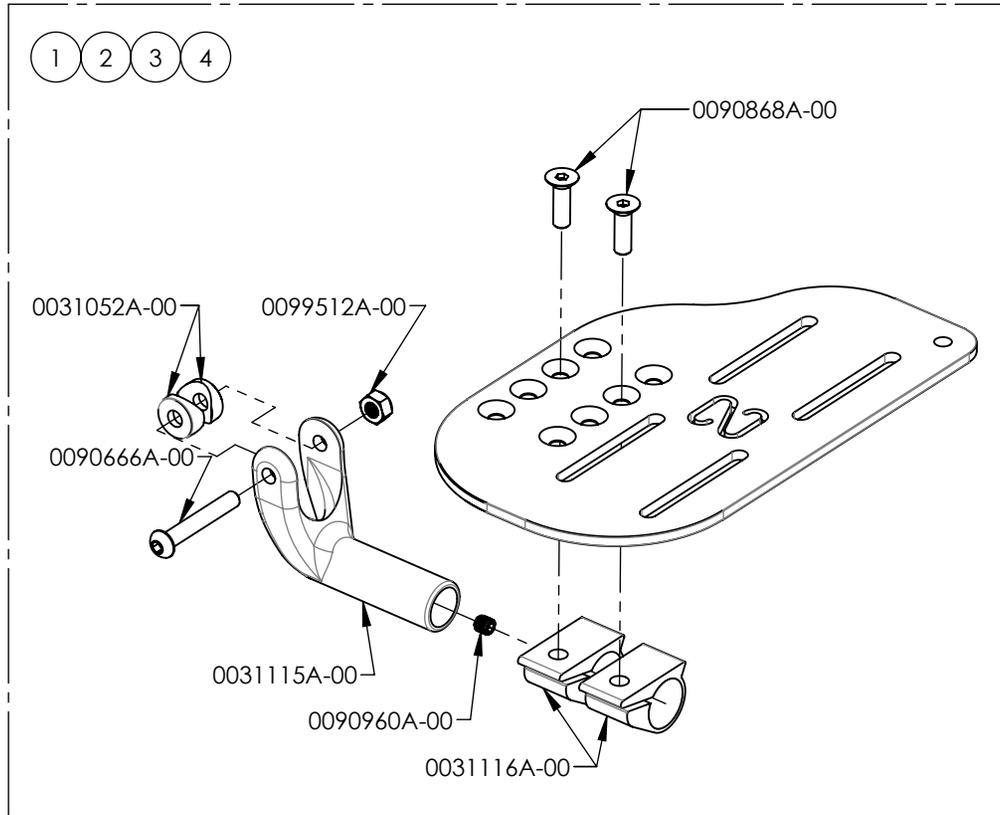


9001363A-00  
Palette - Alu, Newton, droite,  
4½x8po

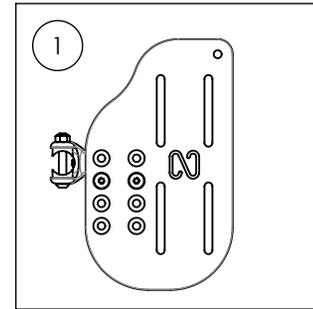


9001364A-00  
Palette - Alu, Newton, droite,  
5½x8po

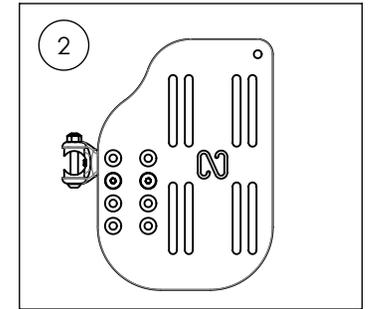

9001365A-00  
Palette - Alu, Newton, droite,  
6½x8po

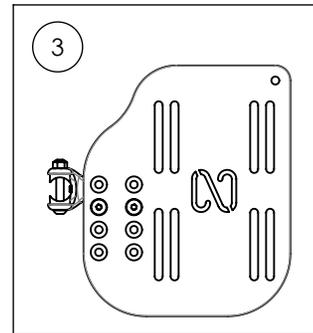

9001366A-00  
Palette - Alu, Newton, droite,  
7½x8po

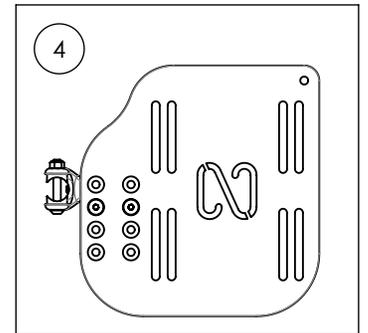


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


**9001367A\_9001370A**

**Palette - Aluminium, Newton réglable en angle, gauche, 8 po de profondeur**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                     | 9001367 /QTE | 9001368 /QTE | 9001369 /QTE | 9001370 /QTE |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1        | 0031596A-00 | PALETTE NEWTON AJUST ALU 4.5x8po, GAUCHE - ASSY | 1            | -            | -            | -            |
| 2        | 0031598A-00 | PALETTE NEWTON AJUST ALU 5.5x8po, GAUCHE - ASSY | -            | 1            | -            | -            |
| 3        | 0031600A-00 | PALETTE NEWTON AJUST ALU 6.5x8po, GAUCHE - ASSY | -            | -            | 1            | -            |
| 4        | 0031602A-00 | PALETTE NEWTON AJUST ALU 7.5x8po, GAUCHE - ASSY | -            | -            | -            | 1            |

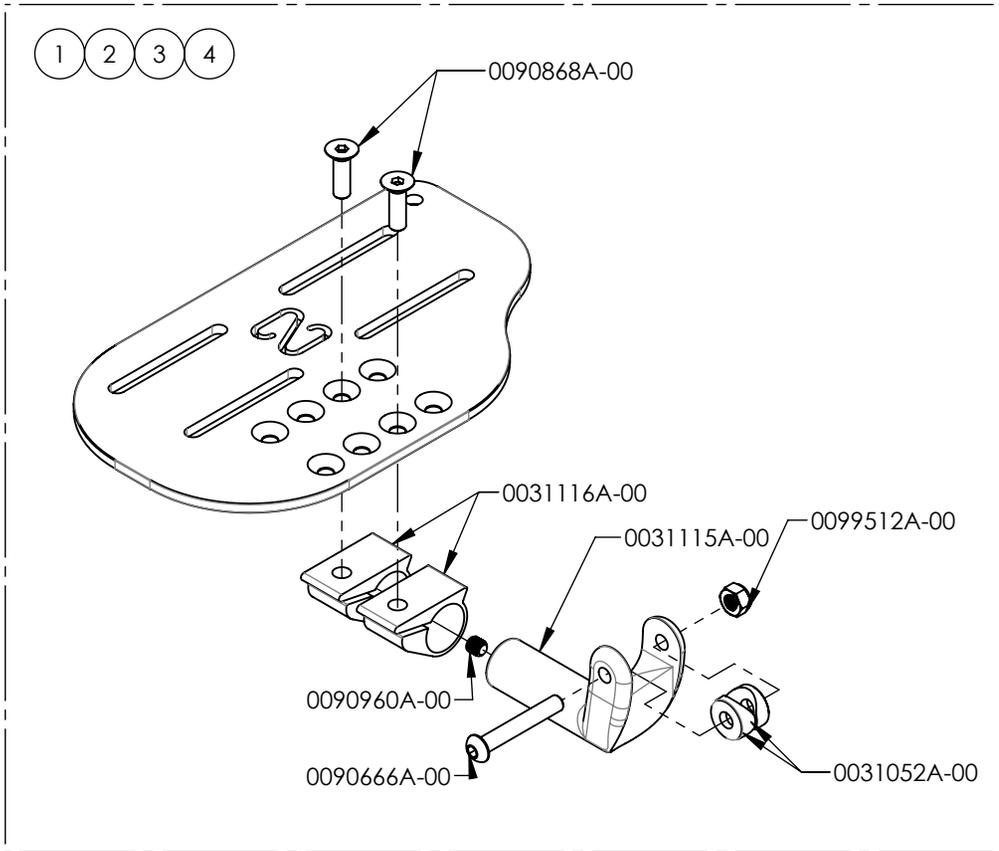


9001367A-00  
Palette - Alu, Newton, gauche,  
4½x8po

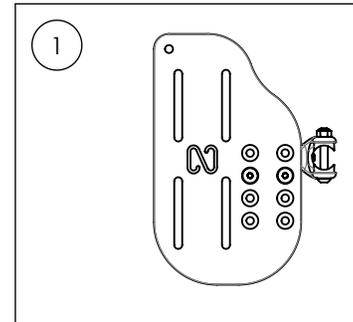


9001368A-00  
Palette - Alu, Newton, gauche,  
5½x8po

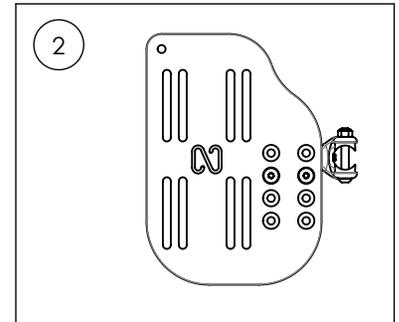

9001369A-00  
Palette - Alu, Newton, gauche,  
6½x8po

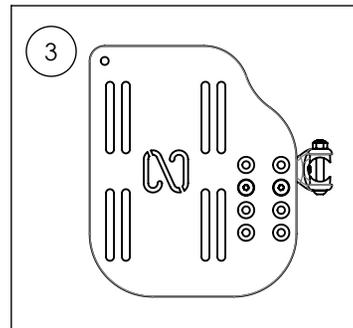





9001370A-00  
Palette - Alu, Newton, gauche,  
7½x8po

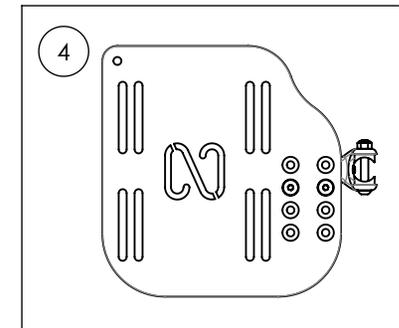

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001380A-00**  
**EXTENSION - PALETTE PLEINE LARGEUR RABATTABLE**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                      | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 1        | 0031570A-00 | EXTENSION PALETTE RABATTABLE PIVOT LONG - ASSY   | 1   |
| 2        | 0031571A-00 | EXTENSION PALETTE RABATTABLE ANCRAGE LONG - ASSY | 1   |

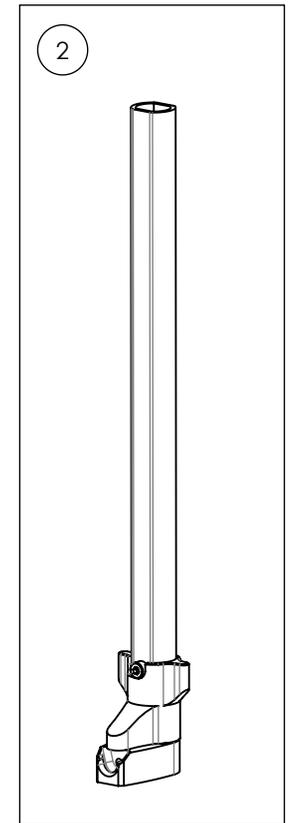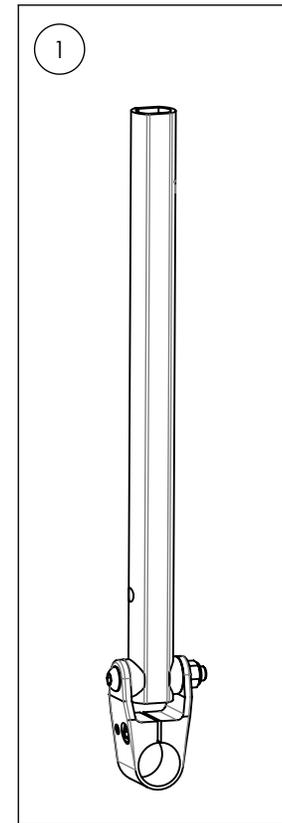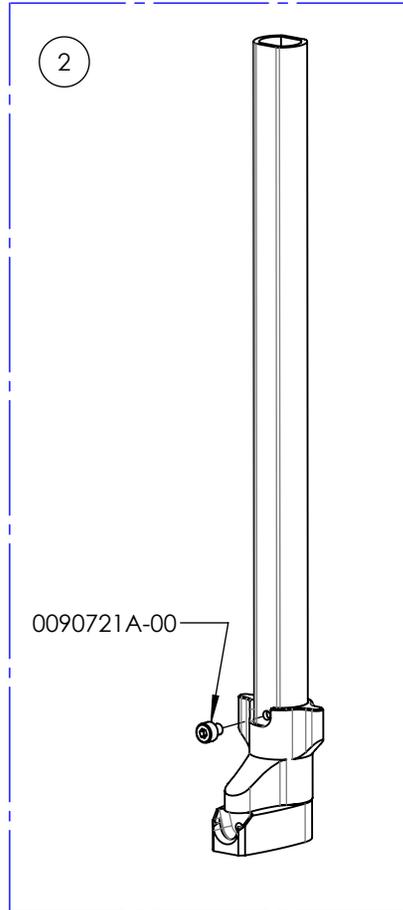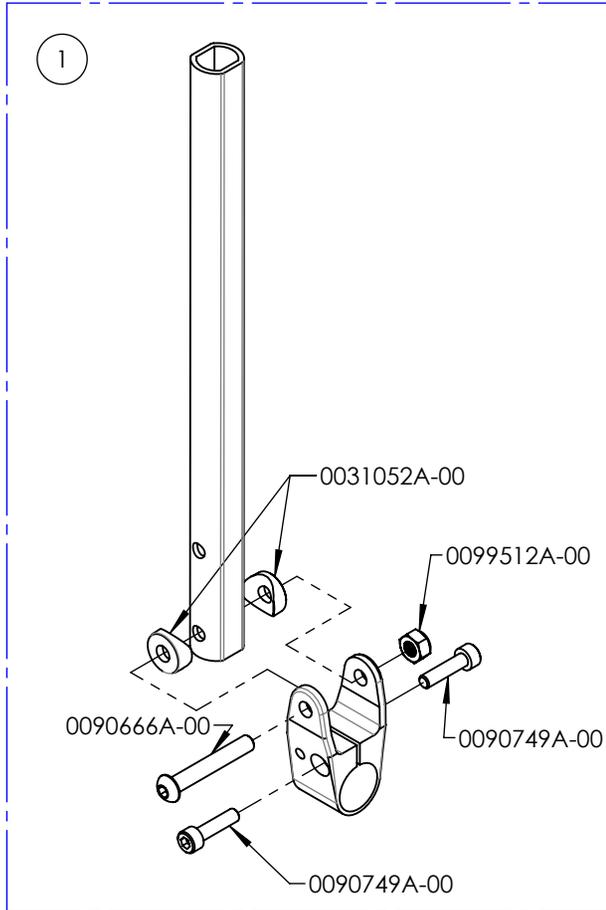


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001384A 9001386A**  
**Palette - Fibre de carbone, Newton réglable en angle, droite, 8 po de profondeur**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                      | 9001384 /QTE | 9001385 /QTE | 9001386 /QTE |
|----------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 1        | 0031607A-00 | PALETTE NEWTON AJUST CARB 5.5x8po, DROITE - ASSY | 1            | -            | -            |
| 2        | 0031609A-00 | PALETTE NEWTON AJUST CARB 6.5x8po, DROITE - ASSY | -            | 1            | -            |
| 3        | 0031611A-00 | PALETTE NEWTON AJUST CARB 7.5x8po, DROITE - ASSY | -            | -            | 1            |

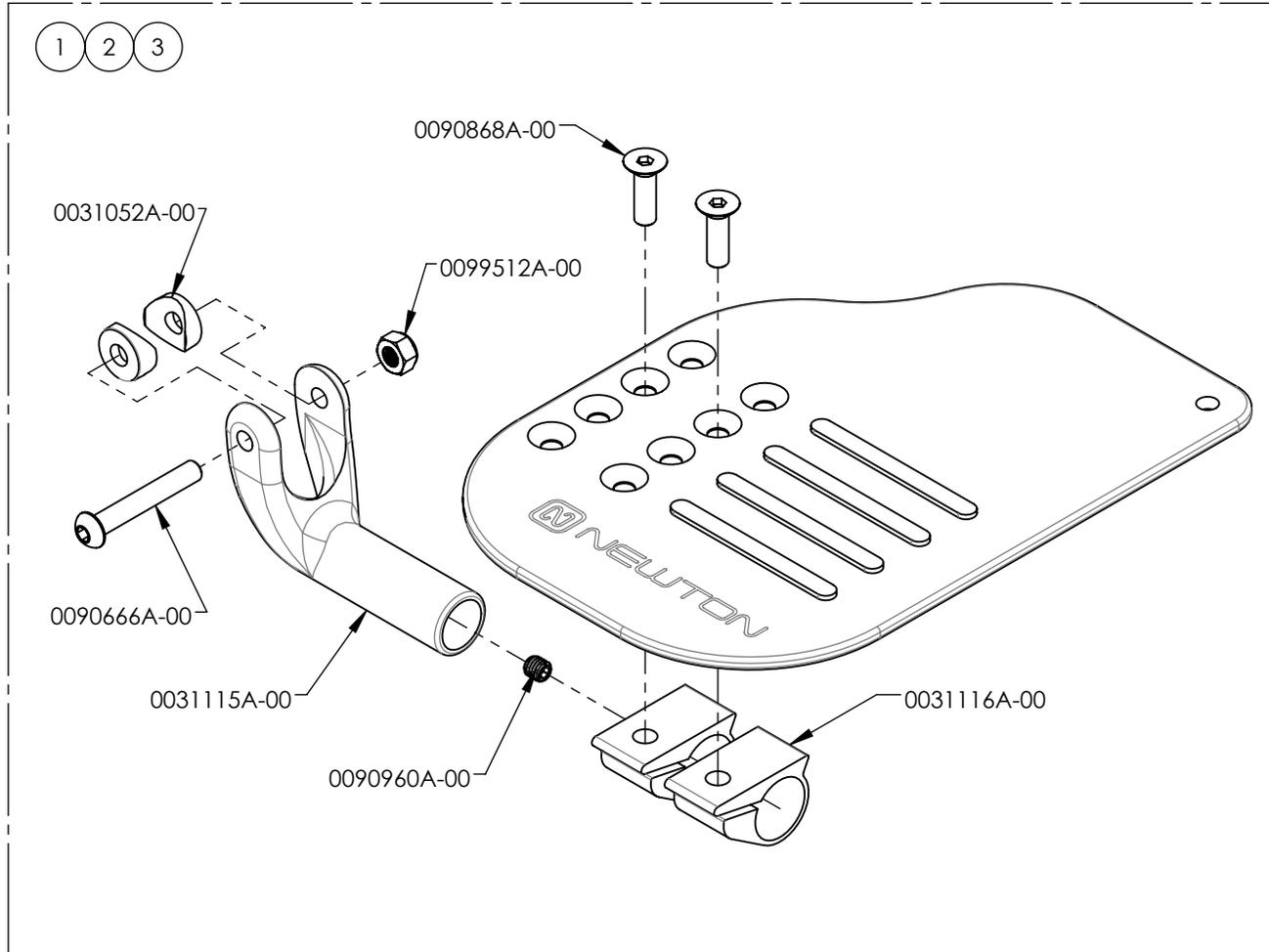


9001384A-00  
 Palette - Carbone, Newton, droite,  
 5½x8po

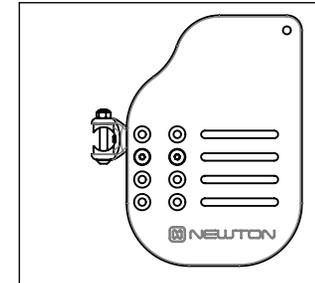

9001385A-00  
 Palette - Carbone, Newton, droite,  
 6½x8po

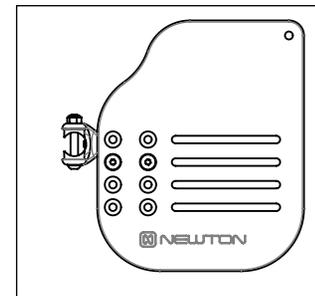


9001386A-00  
 Palette - Carbone, Newton, droite,  
 7½x8po

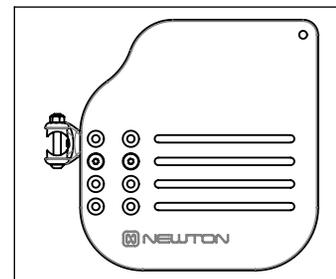


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001387A 9001389A**  
**Palette - Fibre de carbone, Newton réglable en angle, gauche, 8 po de profondeur**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                      | 9001387 /QTE | 9001388 /QTE | 9001389 /QTE |
|----------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 1        | 0031608A-00 | PALETTE NEWTON AJUST CARB 5.5x8po, GAUCHE - ASSY | 1            | -            | -            |
| 2        | 0031610A-00 | PALETTE NEWTON AJUST CARB 6.5x8po, GAUCHE - ASSY | -            | 1            | -            |
| 3        | 0031612A-00 | PALETTE NEWTON AJUST CARB 7.5x8po, GAUCHE - ASSY | -            | -            | 1            |

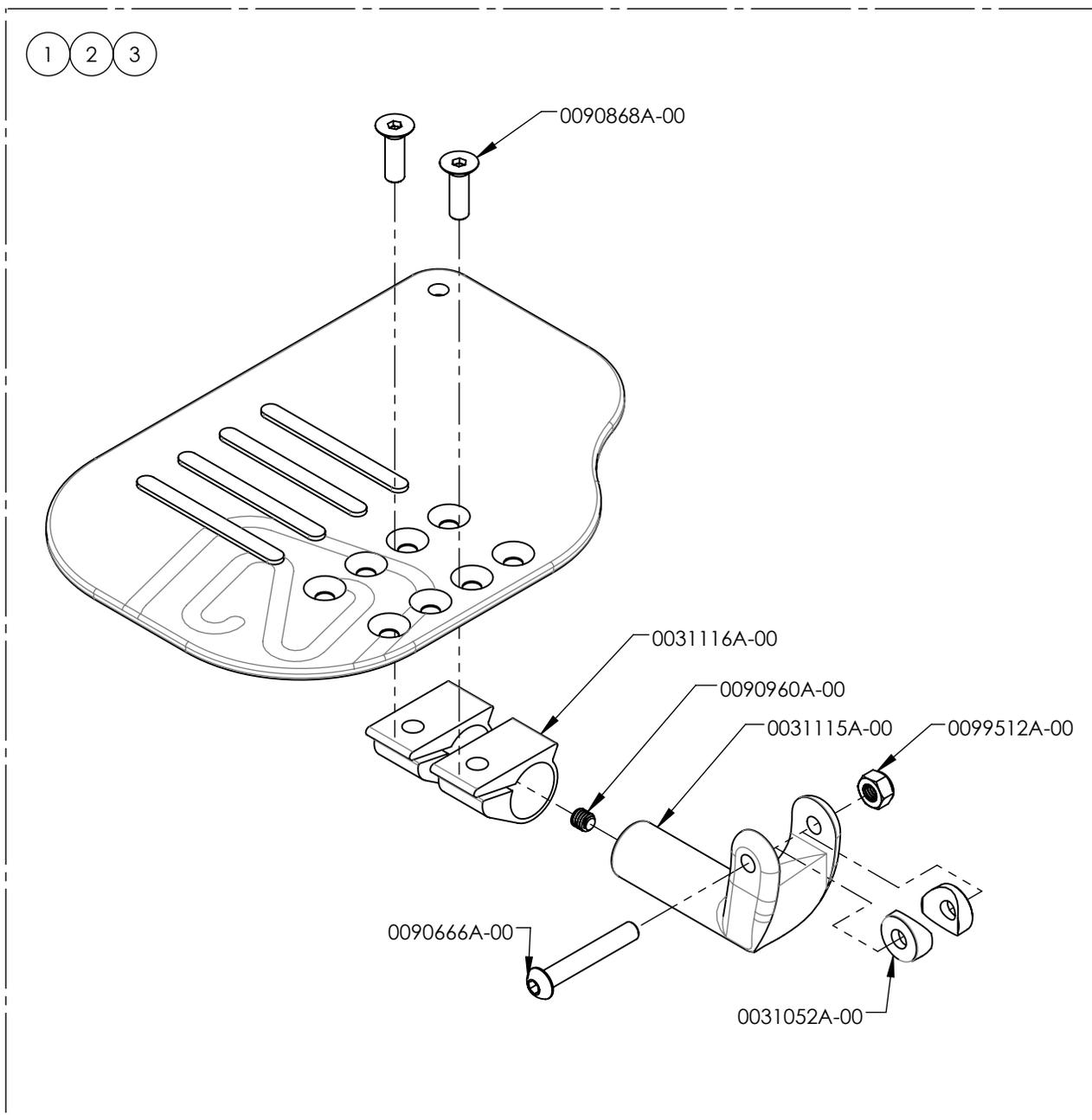


9001387A-00  
 Palette - Carbone, Newton, gauche, 5½x8po

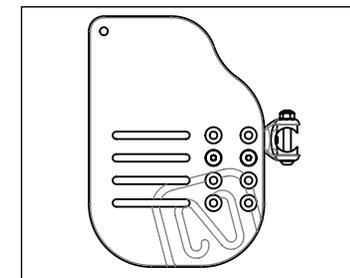

9001388A-00  
 Palette - Carbone, Newton, gauche, 6½x8po

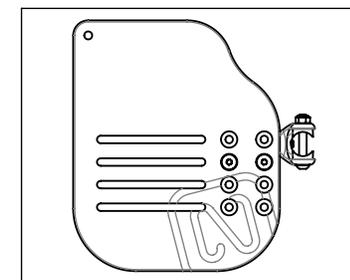


9001389A-00  
 Palette - Carbone, Newton, gauche, 7½x8po

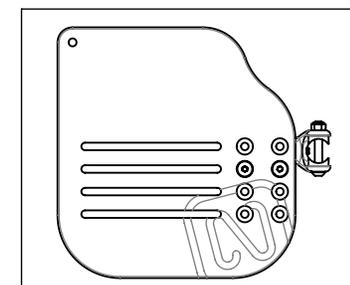


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001394A 9001395A & 9002865A 9002866A**  
**MONTAGE FRONTAL - ALU, NEWTON, DROITE, 10po**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                               | 9001394 | 9001395 | 9002865 | 9002866 |
|----------|-------------|---|---------|---------|---------|---------|
| 1        | 0031126B-00 | PALETTE NEWTON AJUST ALU 4.5x10po, DROITE | 1       | -       | -       | -       |
| 2        | 0031137B-00 | PALETTE NEWTON AJUST ALU 5.5x10po, DROITE | -       | 1       | -       | -       |
| 3        | 0031190B-00 | PALETTE NEWTON AJUST ALU 6.5x10po, DROITE | -       | -       | 1       | -       |
| 4        | 0031192B-00 | PALETTE NEWTON AJUST ALU 7.5x10po, DROITE | -       | -       | -       | 1       |
| 5        | 0031112A-00 | PIVOT PALETTE MONTAGE FRONTAL, DROITE     | 1       | 1       | 1       | 1       |
| 6        | 0031116A-00 | EXTRUSION SIMPLE PALETTE AJUSTABLE ANGLE  | 2       | 2       | 2       | 2       |
| 7        | 0090868A-00 | VIS TÊTE FRAISÉE M6x1x20mm L              | 2       | 2       | 2       | 2       |

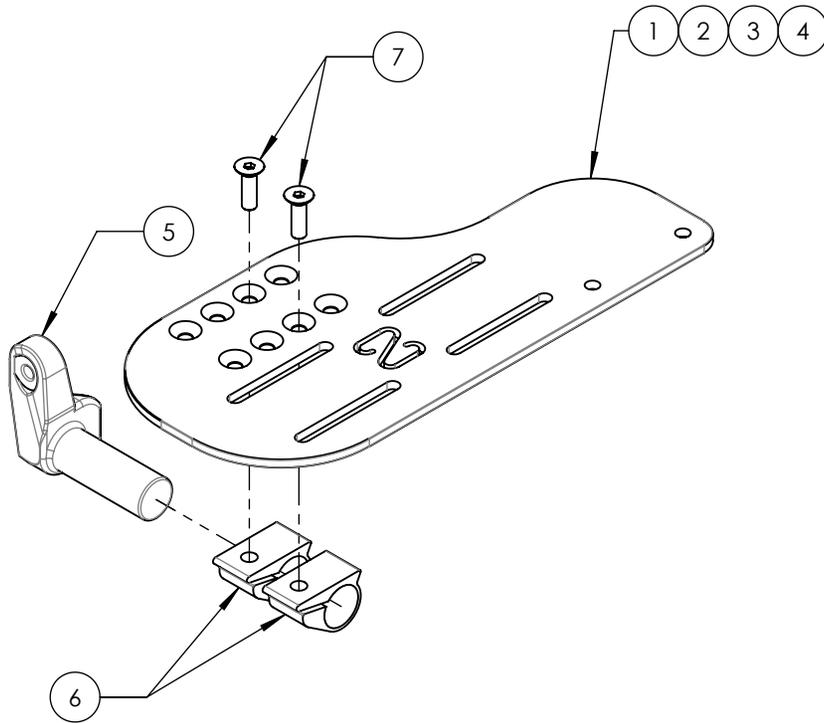


9001394A-00  
MONTAGE FRONTAL - ALU, NEWTON,  
DROITE, 4½x10po

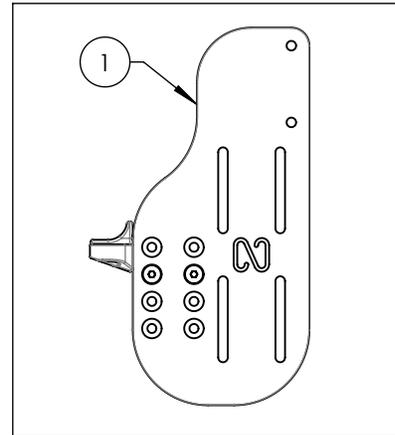


9001395A-00  
MONTAGE FRONTAL - ALU, NEWTON,  
DROITE, 5½x10po

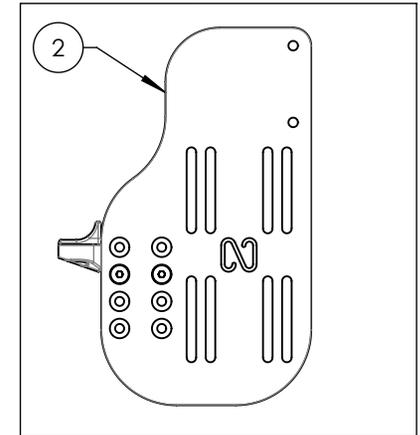

9002865A-00  
MONTAGE FRONTAL - ALU, NEWTON,  
DROITE, 6½x10po

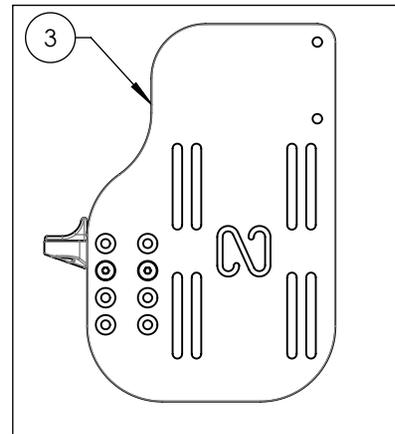


9002866A-00  
MONTAGE FRONTAL - ALU, NEWTON,  
DROITE, 7½x10po

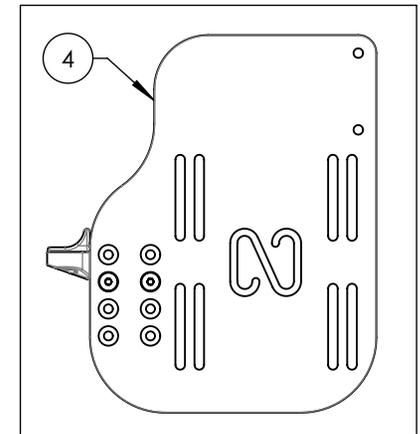


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001396A 9001397A & 9002867A 9002868A  
PALETTE - ALUMINIUM, NEWTON RÉGLABLE EN ANGLE,  
MONTAGE FRONTAL, GAUCHE, 10 po DE PROFONDEUR**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                               | 9001396 | 9001397 | 9002867 | 9002868 |
|----------|-------------|---|---------|---------|---------|---------|
| 1        | 0031125B-00 | PALETTE NEWTON AJUST ALU 4.5x10po, GAUCHE | 1       | -       | -       | -       |
| 2        | 0031136B-00 | PALETTE NEWTON AJUST ALU 5.5x10po, GAUCHE | -       | 1       | -       | -       |
| 3        | 0031191B-00 | PALETTE NEWTON AJUST ALU 6.5x10po, GAUCHE | -       | -       | 1       | -       |
| 4        | 0031193B-00 | PALETTE NEWTON AJUST ALU 7.5x10po, GAUCHE | -       | -       | -       | 1       |
| 5        | 0031113A-00 | PIVOT PALETTE MONTAGE FRONTAL, GAUCHE     | 1       | 1       | 1       | 1       |
| 6        | 0031116A-00 | EXTRUSION SIMPLE PALETTE AJUSTABLE ANGLE  | 2       | 2       | 2       | 2       |
| 7        | 0090868A-00 | VIS TÊTE FRAISÉE M6x1x20mm L              | 2       | 2       | 2       | 2       |

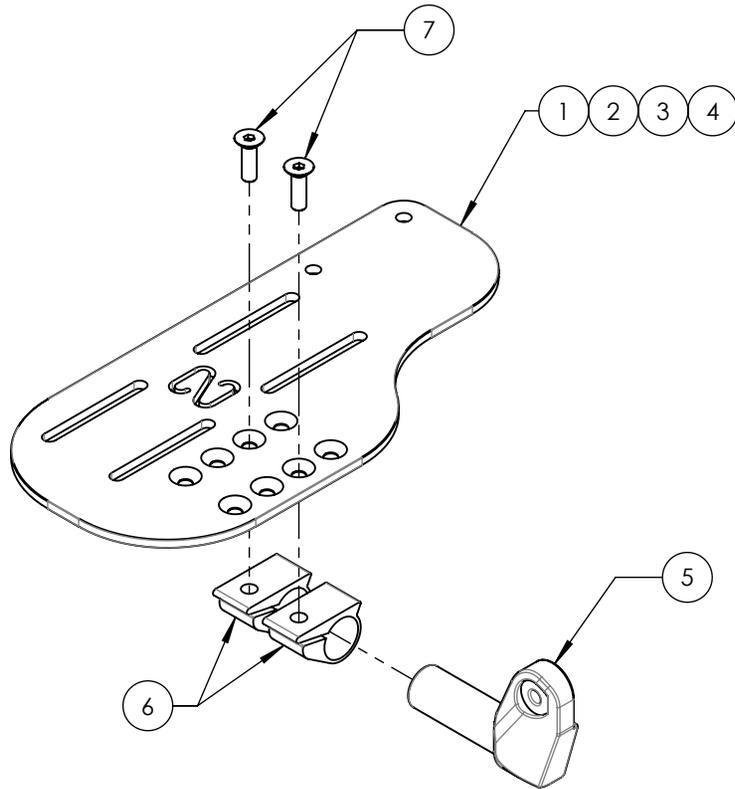


9001396A-00  
MONTAGE FRONTAL - ALU  
NEWTON, GAUCHE, 4½X10po

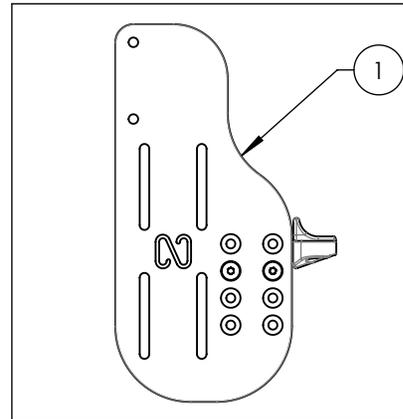


9001397A-00  
MONTAGE FRONTAL - ALU  
NEWTON, GAUCHE, 5½X10po

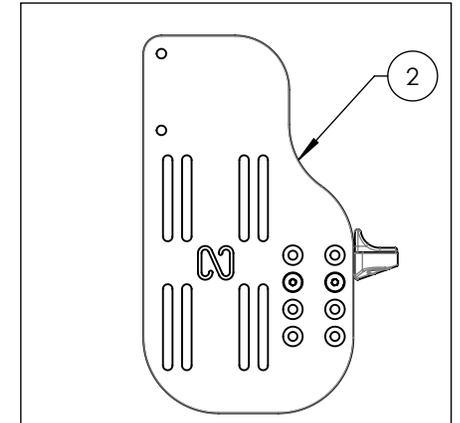

9002867A-00  
MONTAGE FRONTAL - ALU  
NEWTON, GAUCHE, 6½X10po

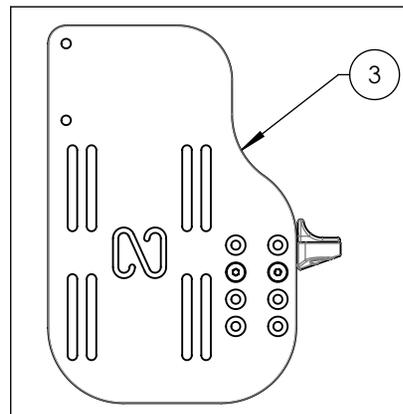


9002868A-00  
MONTAGE FRONTAL - ALU  
NEWTON, GAUCHE, 7½X10po

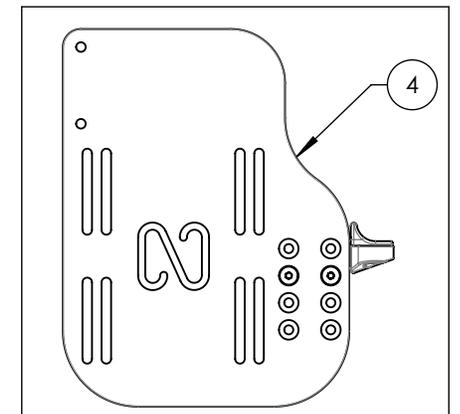


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001398\_9001399 & 9002869\_9002870**  
**Palette - Aluminium, Newton réglable en angle, droite, 10 po de profondeur**


| No ITEM | No PIECE     | DESCRIPTION                                      | 9001398 /QTE | 9001399 /QTE | 9002869 /QTE | 9002870 /QTE |
|---------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1       | 0031603 B-00 | PALETTE NEWTON AJUST ALU 4.5x10po, DROITE - ASSY | 1            | -            | -            | -            |
| 2       | 0031605 B-00 | PALETTE NEWTON AJUST ALU 5.5x10po, DROITE - ASSY | -            | 1            | -            | -            |
| 3       | 0031630 B-00 | PALETTE NEWTON AJUST ALU 6.5x10po, DROITE - ASSY | -            | -            | 1            | -            |
| 4       | 0031632 B-00 | PALETTE NEWTON AJUST ALU 7.5x10po, DROITE - ASSY | -            | -            | -            | 1            |

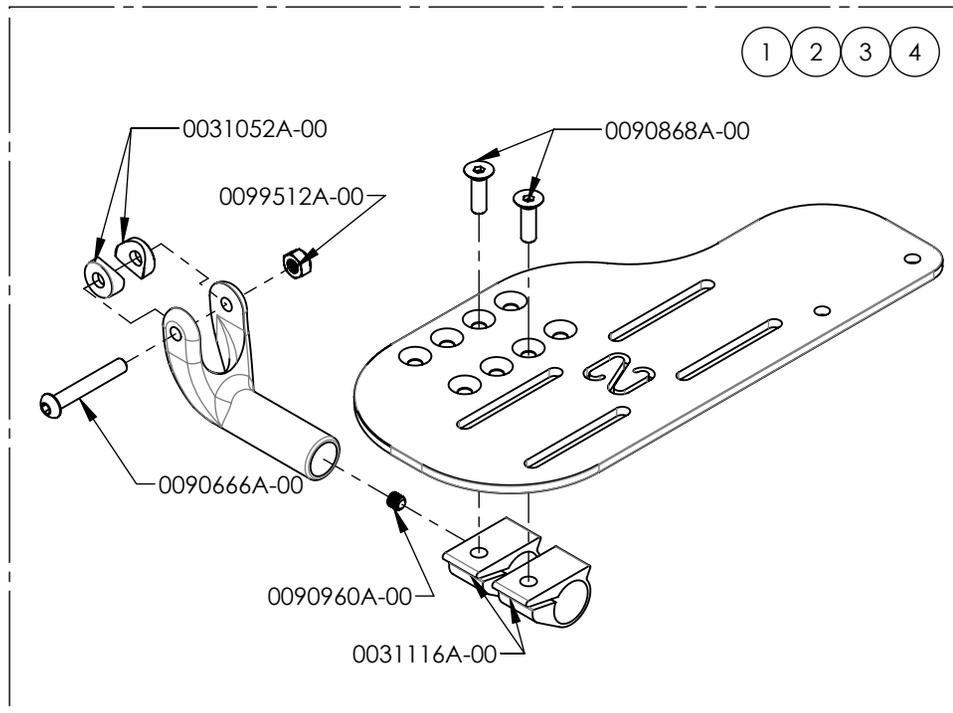


9001398A-00  
 Palette - Alu, Newton, droite,  
 4½x10po

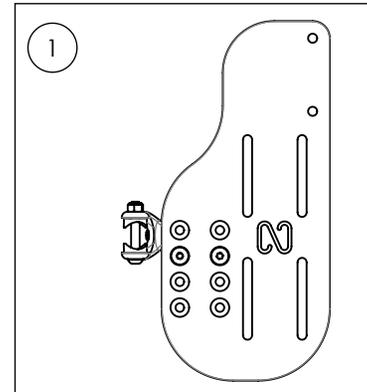


9001399A-00  
 Palette - Alu, Newton, droite,  
 5½x10po

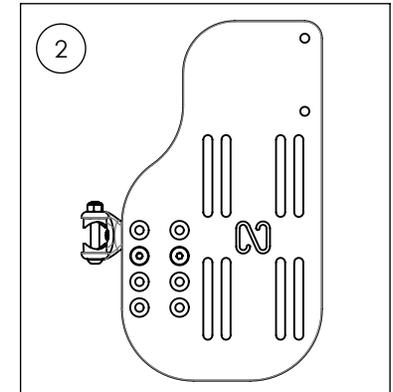

9002869A-00  
 Palette - Alu, Newton, droite,  
 6½x10po

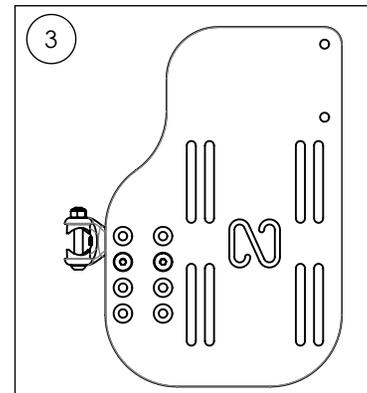


9002870A-00  
 Palette - Alu, Newton, droite,  
 7½x10po

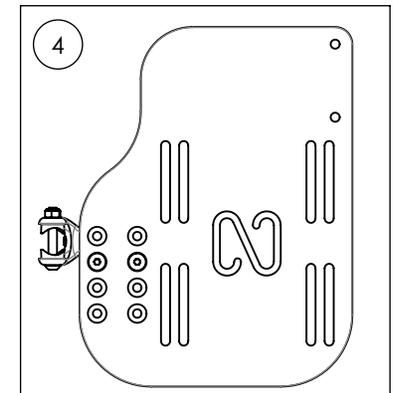


**9001400A 9001401A & 9002871A 9002872A**  
**PALETTE - ALUMINIUM, NEWTON RÉGLABLE EN ANGLE, GAUCHE,**  
**10 po DE PROFONDEUR**


| NO. ITEM | NO. PIÈCE    | DESCRIPTION                                      | 9001400 /QTE | 9001401 /QTE | 9002871 /QTE | 9002872 /QTE |
|----------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1        | 0031604 B-00 | PALETTE NEWTON AJUST ALU 4.5X10PO, GAUCHE - ASSY | 1            | -            | -            | -            |
| 2        | 0031606 B-00 | PALETTE NEWTON AJUST ALU 5.5X10PO, GAUCHE - ASSY | -            | 1            | -            | -            |
| 3        | 0031631 B-00 | PALETTE NEWTON AJUST ALU 6.5X10PO, GAUCHE - ASSY | -            | -            | 1            | -            |
| 4        | 0031633 B-00 | PALETTE NEWTON AJUST ALU 7.5X10PO, GAUCHE - ASSY | -            | -            | -            | 1            |

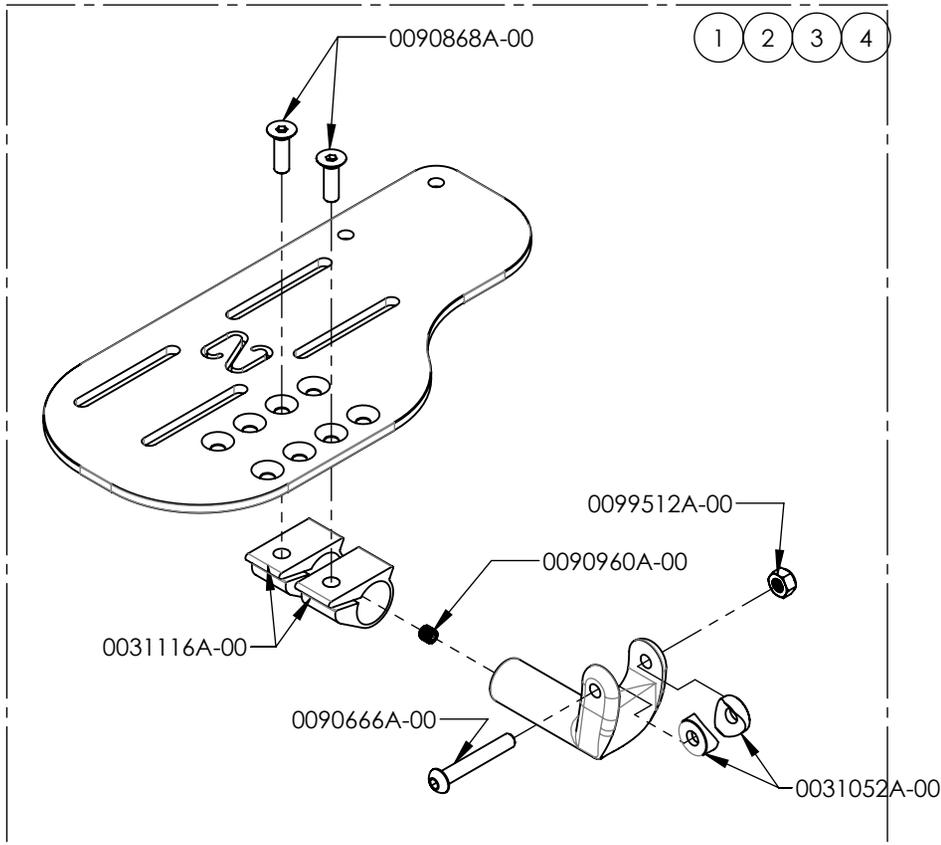


9001400A-00  
 PALETTE - ALU, NEWTON, GAUCHE,  
 4½X10po

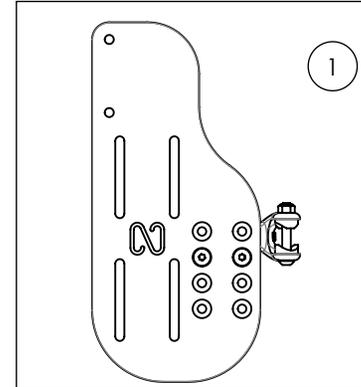


9001401A-00  
 PALETTE - ALU, NEWTON, GAUCHE,  
 5½X10po

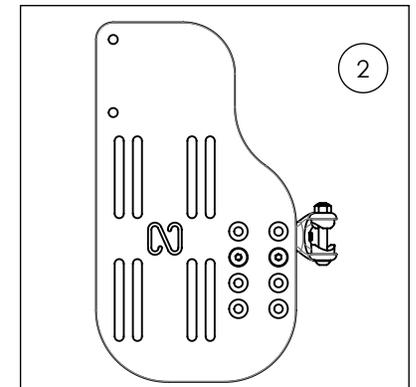

9002871A-00  
 PALETTE - ALU, NEWTON, GAUCHE,  
 6½X10po

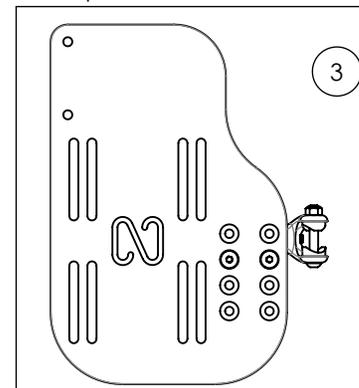


9002872A-00  
 PALETTE - ALU, NEWTON, GAUCHE,  
 7½X10po

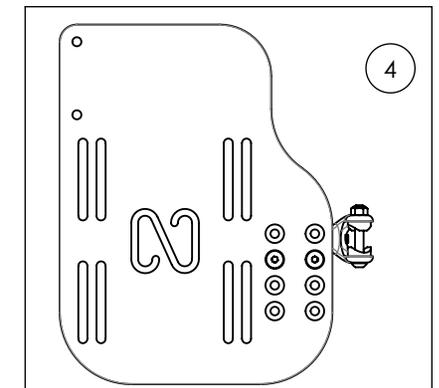


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001402A 9001405A**  
**PALETTE - ALUMINIUM, NEWTON RÉGLABLE EN ANGLE,**  
**MONTAGE FRONTAL, DROITE, 8 po DE PROFONDEUR**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                              | 9001402 | 9001403 | 9001404 | 9001405 |
|----------|-------------|--|---------|---------|---------|---------|
| 1        | 0031124A-00 | PALETTE NEWTON AJUST ALU 4.5x8po, DROITE | 1       | -       | -       | -       |
| 2        | 0031118A-00 | PALETTE NEWTON AJUST ALU 5.5x8po, DROITE | -       | 1       | -       | -       |
| 3        | 0031120A-00 | PALETTE NEWTON AJUST ALU 6.5x8po, DROITE | -       | -       | 1       | -       |
| 4        | 0031122A-00 | PALETTE NEWTON AJUST ALU 7.5x8po, DROITE | -       | -       | -       | 1       |
| 5        | 0031116A-00 | EXTRUSION SIMPLE PALETTE AJUSTABLE ANGLE | 2       | 2       | 2       | 2       |
| 6        | 0090868A-00 | VIS TÊTE FRAISÉE M6x1x20mm L             | 2       | 2       | 2       | 2       |
| 7        | 0031112A-00 | PIVOT PALETTE MONTAGE FRONTAL, DROITE    | 1       | 1       | 1       | 1       |

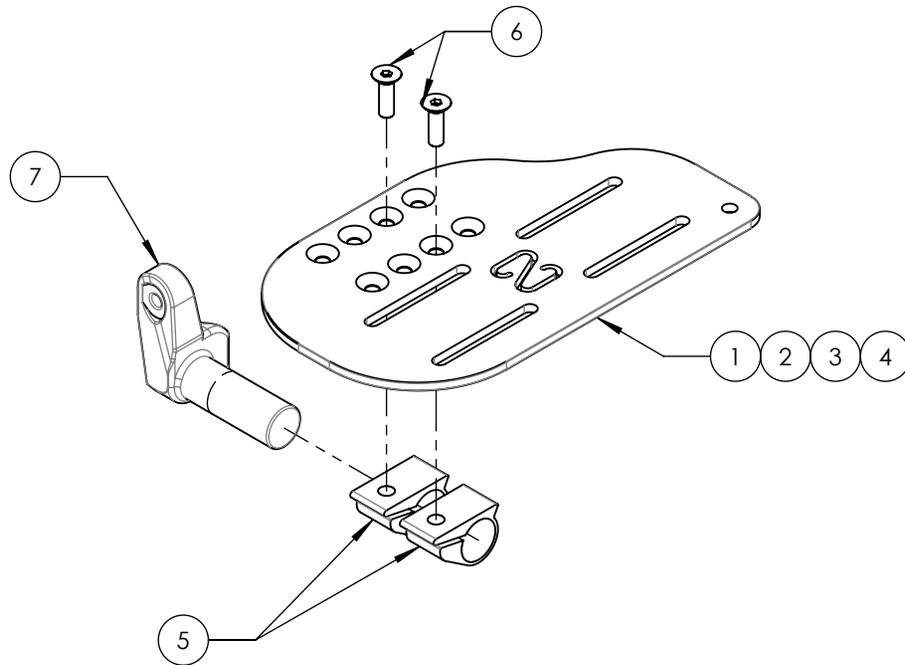


9001402A-00  
MONTAGE FRONTAL - ALU,  
NEWTON, DROITE, 4½X8po

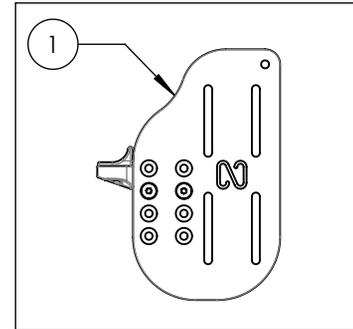


9001403A-00  
MONTAGE FRONTAL - ALU,  
NEWTON, DROITE, 5½X8po

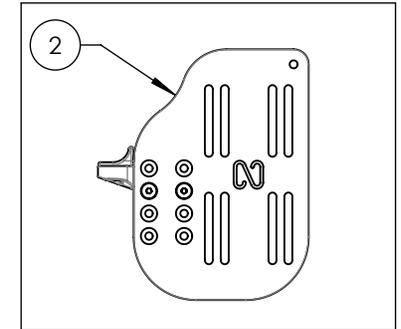

9001404A-00  
MONTAGE FRONTAL - ALU,  
NEWTON, DROITE, 6½X8po

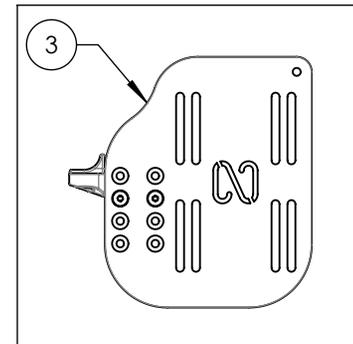


9001405A-00  
MONTAGE FRONTAL - ALU,  
NEWTON, DROITE, 7½X8po

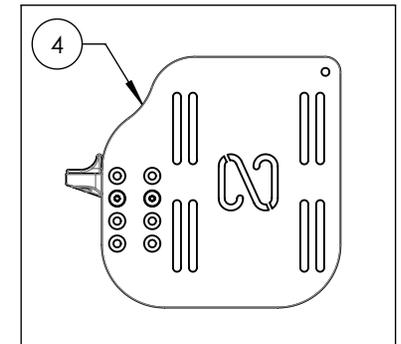


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001406A\_9001409A  
PALETTE - ALUMINIUM, NEWTON RÉGLABLE EN ANGLE, MONTAGE  
FRONTAL, GAUCHE, 8 po DE PROFONDEUR**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                              | 9001406 | 9001407 | 9001408 | 9001409 |
|----------|-------------|--|---------|---------|---------|---------|
| 1        | 0031123A-00 | PALETTE NEWTON AJUST ALU 4.5x8po, GAUCHE | 1       | -       | -       | -       |
| 2        | 0031117A-00 | PALETTE NEWTON AJUST ALU 5.5x8po, GAUCHE | -       | 1       | -       | -       |
| 3        | 0031119A-00 | PALETTE NEWTON AJUST ALU 6.5x8po, GAUCHE | -       | -       | 1       | -       |
| 4        | 0031121A-00 | PALETTE NEWTON AJUST ALU 7.5x8po, GAUCHE | -       | -       | -       | 1       |
| 5        | 0031113A-00 | PIVOT PALETTE MONTAGE FRONTAL, GAUCHE    | 1       | 1       | 1       | 1       |
| 6        | 0031116A-00 | EXTRUSION SIMPLE PALETTE AJUSTABLE ANGLE | 2       | 2       | 2       | 2       |
| 7        | 0090868A-00 | VIS TÊTE FRAISÉE M6x1x20mm L             | 2       | 2       | 2       | 2       |

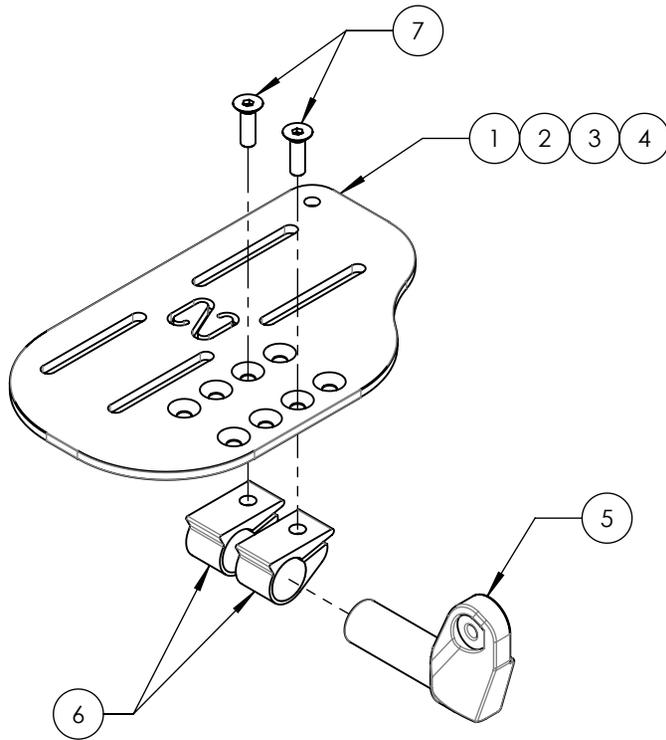


9001406A-00  
MONTAGE FRONTAL - ALU,  
NEWTON, GAUCHE, 4½X8po

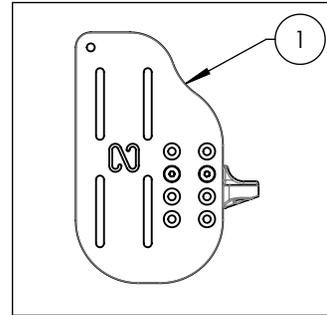


9001407A-00  
MONTAGE FRONTAL - ALU,  
NEWTON, GAUCHE, 5½X8po

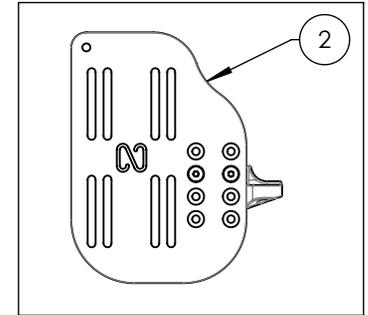

9001408A-00  
MONTAGE FRONTAL - ALU,  
NEWTON, GAUCHE, 6½X8po

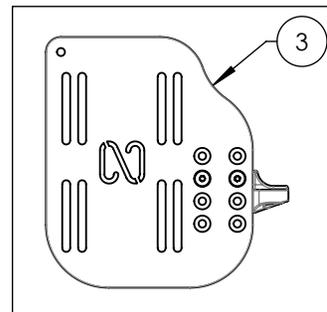



9001409A-00  
MONTAGE FRONTAL - ALU,  
NEWTON, GAUCHE, 7½X8po

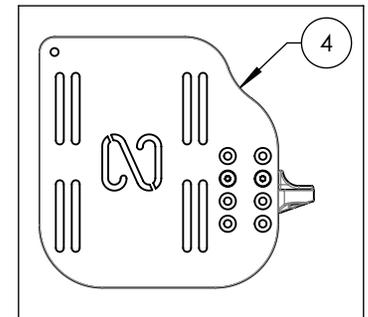

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001411A-00**  
**COURROIE - APPUI-TALON RÉGLABLE EN LONGUEUR**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                          | QTÉ |
|----------|-------------|--------------------------------------|-----|
| 1        | 0031045B-00 | COURROIE APPUI-TALON AJUSTABLE       | 1   |
| 2        | 0031016A-00 | GOUJON DE TALONNIÈRE (M)             | 1   |
| 3        | 0091024A-00 | VIS À PLASTIQUE MINCE M6x2.54x25mm L | 1   |
| 4        | 0099559A-00 | RONDELLE DE BLOCAGE 1/4              | 1   |

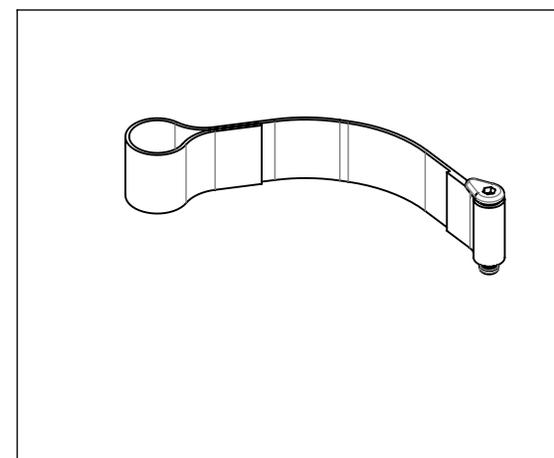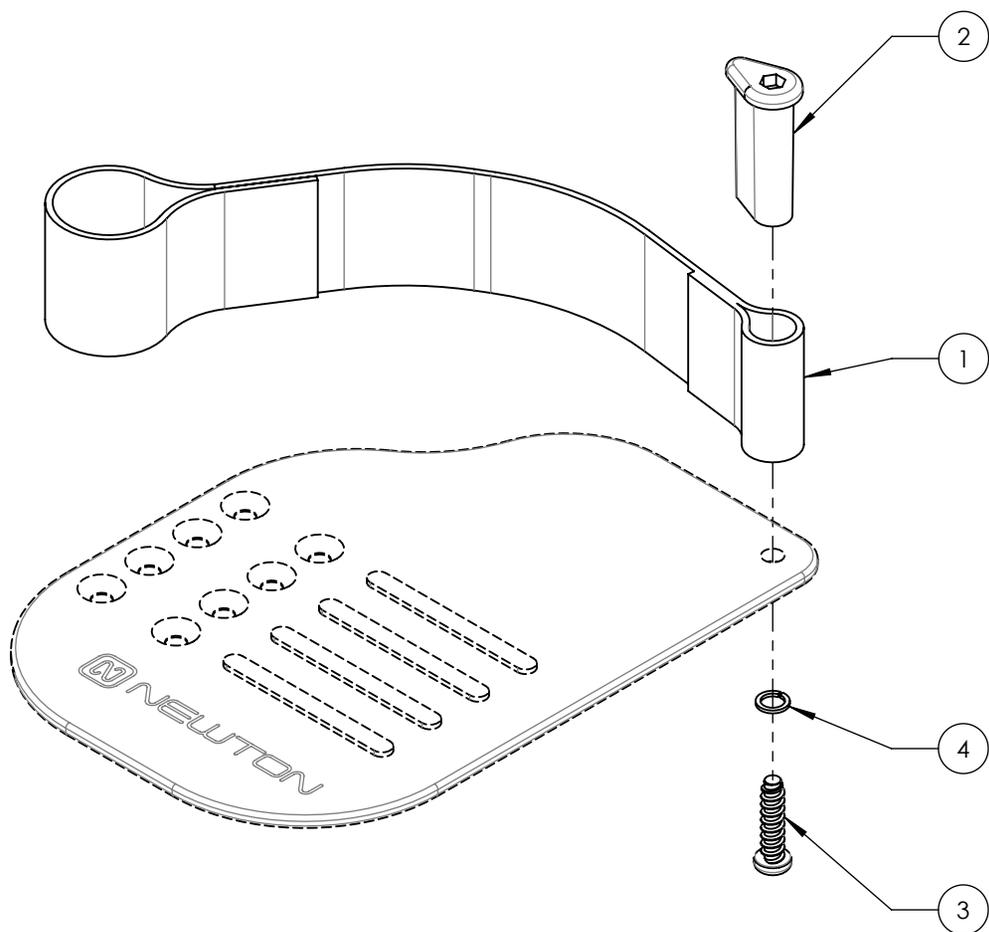


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001430A\_9001432A**


**Palette - Composite, Newton réglable en angle, droite, 8 po en profondeur**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                      | 9001430 | 9001431 | 9001432 |
|----------|-------------|--|---------|---------|---------|
| 1        | 0031589A-00 | PALETTE NEWTON AJUST COMP 5.5x8po, DROITE - ASSY | 1       | -       | -       |
| 2        | 0031591A-00 | PALETTE NEWTON AJUST COMP 6.5x8po, DROITE - ASSY | -       | 1       | -       |
| 3        | 0031593A-00 | PALETTE NEWTON AJUST COMP 7.5x8po, DROITE - ASSY | -       | -       | 1       |



9001430A-00  
 Palette - Composite, Newton,  
 droite, 5½x8po

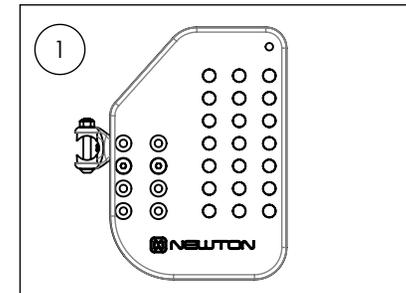

9001431A-00  
 Palette - Composite, Newton, droite,  
 6½x8po

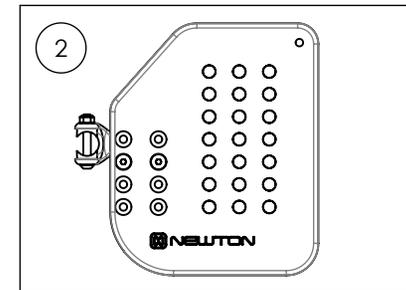

9001432A-00  
 Palette - Composite, Newton,  
 droite, 7½x8po

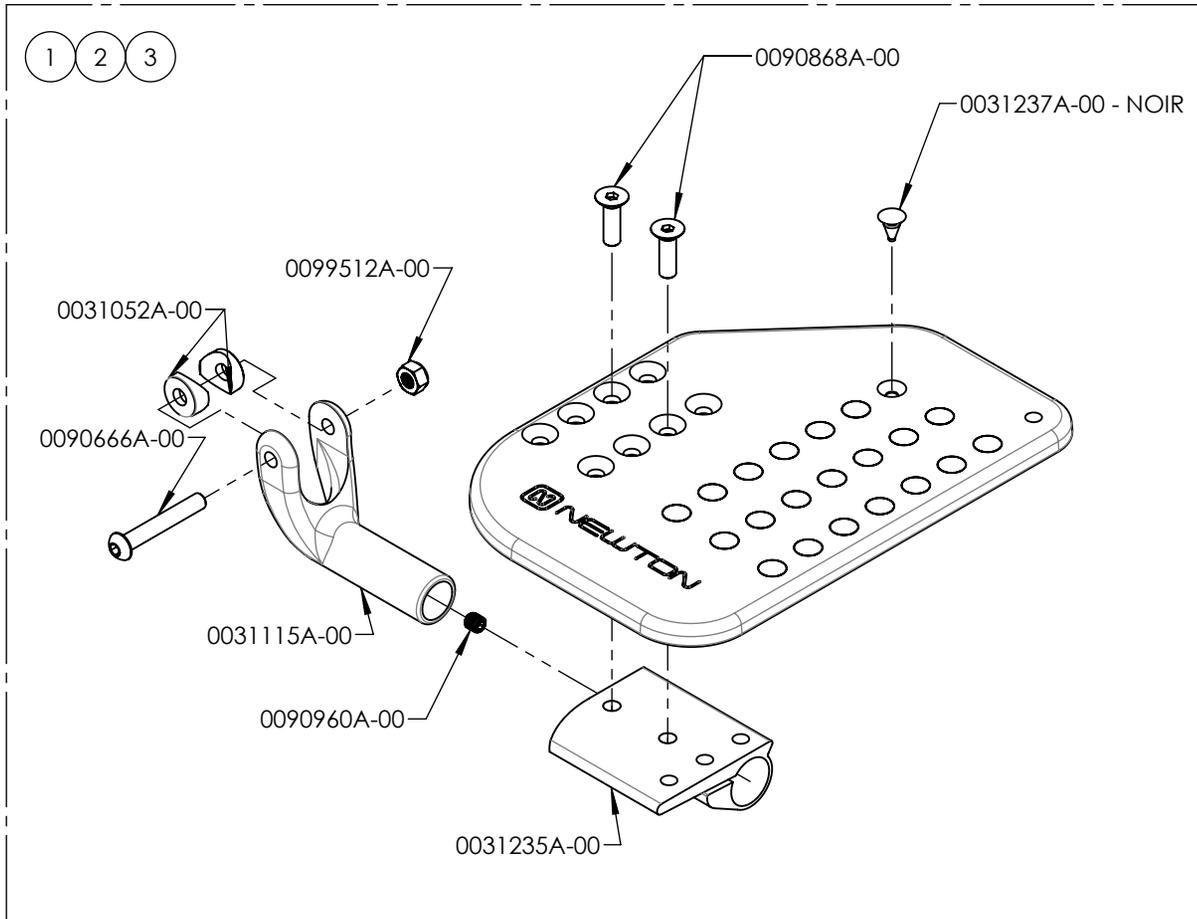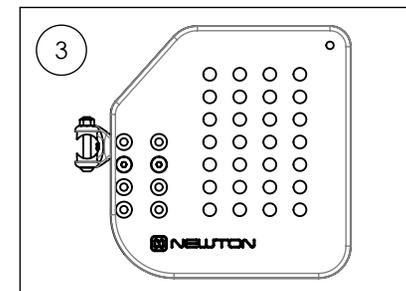


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


**9001433A\_9001435A**

**Palette - Composite, Newton réglable en angle, gauche, 8 po en profondeur**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                      | 9001433 | 9001434 | 9001435 |
|----------|-------------|--|---------|---------|---------|
| 1        | 0031590A-00 | PALETTE NEWTON AJUST COMP 5.5x8po, GAUCHE - ASSY | 1       | -       | -       |
| 2        | 0031592A-00 | PALETTE NEWTON AJUST COMP 6.5x8po, GAUCHE - ASSY | -       | 1       | -       |
| 3        | 0031594A-00 | PALETTE NEWTON AJUST COMP 7.5x8po, GAUCHE - ASSY | -       | -       | 1       |

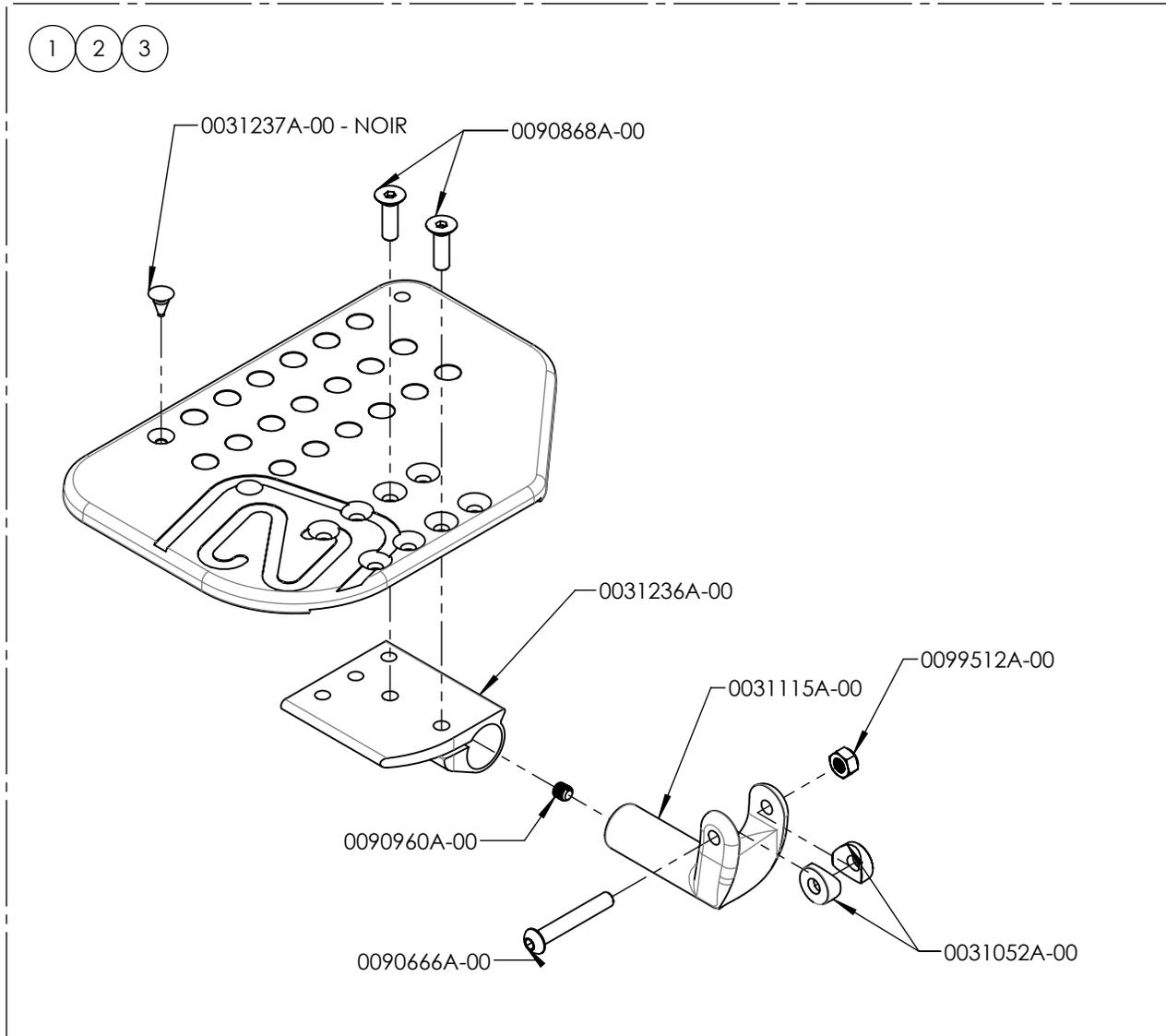


9001433A-00  
Palette - Composite, Newton,  
gauche, 5½x8po

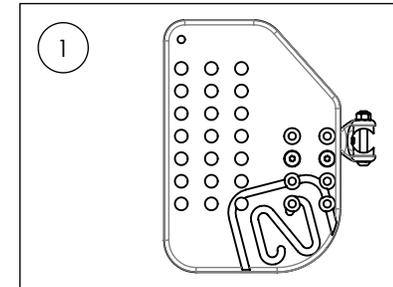

9001434A-00  
Palette - Composite, Newton,  
gauche, 6½x8po

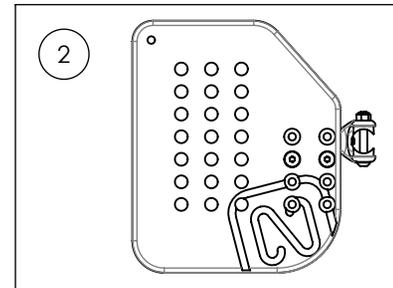

9001435A-00  
Palette - Composite, Newton,  
gauche, 7½x8po

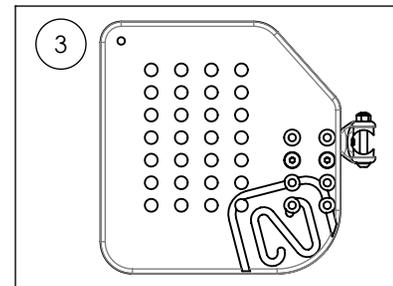


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


**9001752A 9001753A**  
**PARE-CHOCS - À ROULETTE**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                     | 9001752 | 9001753 |
|----------|-------------|---|---------|---------|
| 1        | 0090682A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M8x1.25x45mm L, 28mm FILET      | 1       | 1       |
| 2        | 0022028B-00 | ESPACEUR ROUE AVANT 6mm                         | 1       | -       |
| 3        | 0099590A-00 | RONDELLE 5/16po, 21/64 ID, 19/32 OD, .062 ÉPAIS | 2       | 2       |
| 4        | 0022016A-00 | ROUE AVANT STANDARD 3x1po                       | 1       | 1       |
| 5        | 0090990A-00 | ÉCROU AUTOBLOQUANT MINCE M8x1.25                | 1       | 1       |

9001752A-00  
 PARE-CHOCS - À ROULETTE, PALETTE COMP.

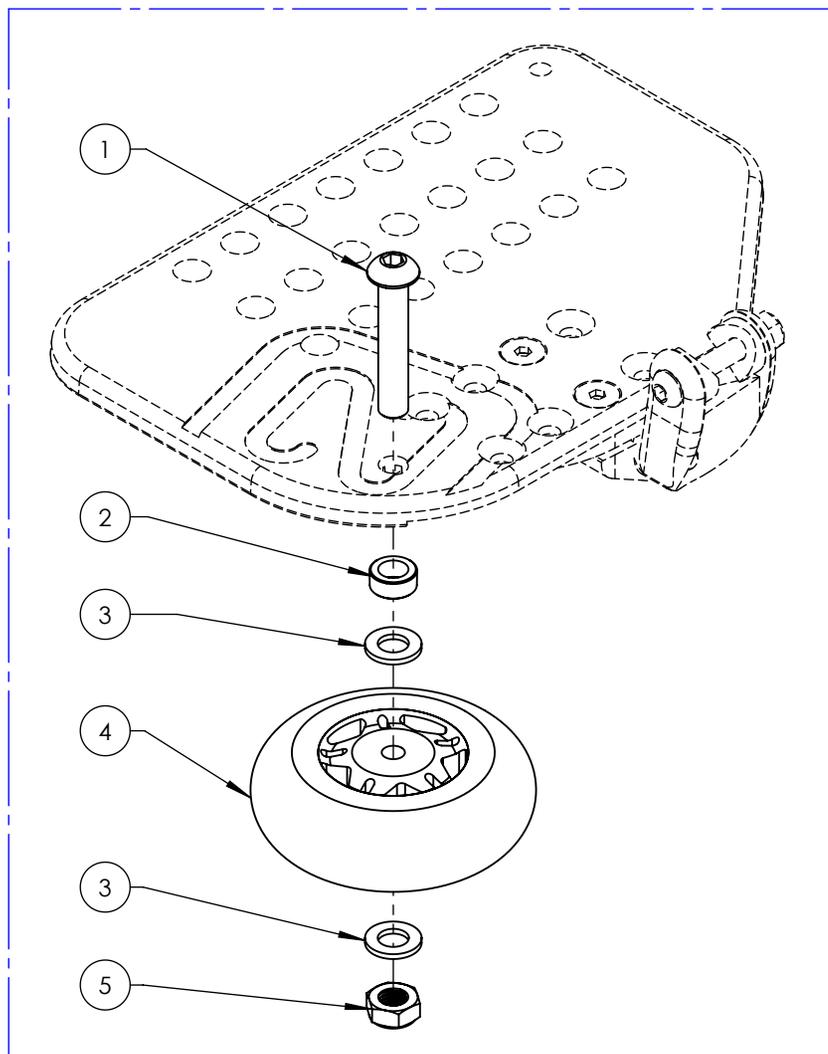


9001753A-00  
 PARE-CHOCS - À ROULETTE, PALETTE ALU & CARBONE

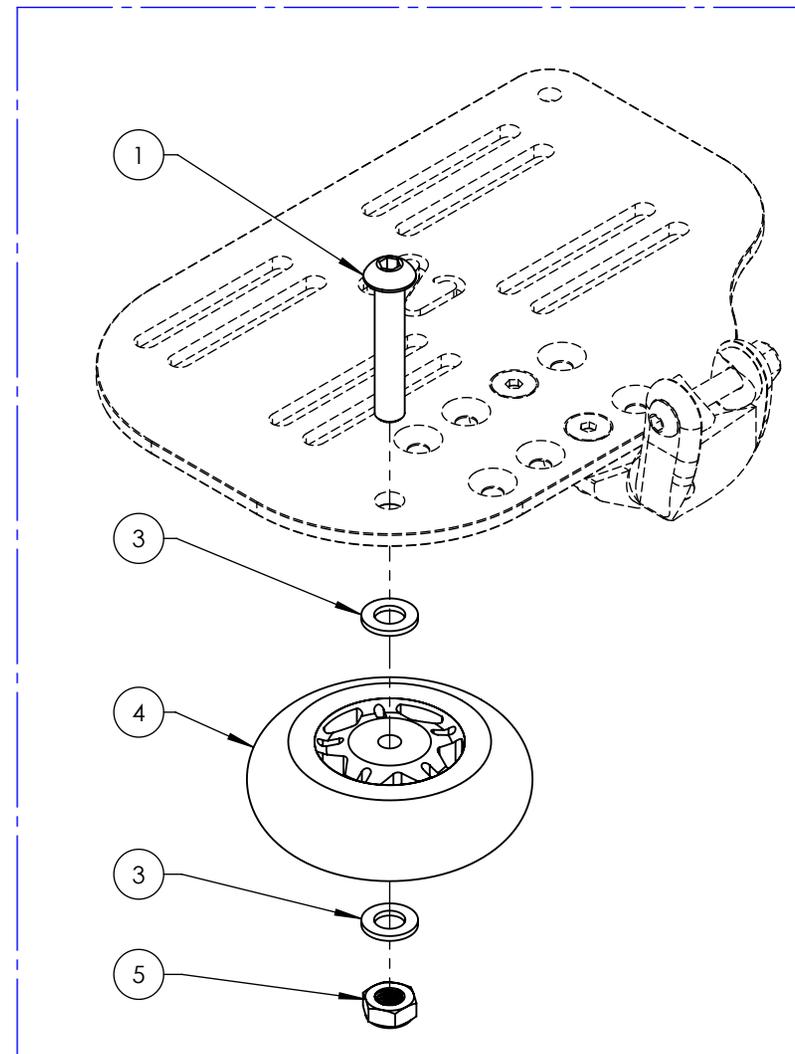


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9002859A 9002861A**  
**PALETTE - PLASTIQUE, NEWTON RÉGLABLE EN ANGLE, MONTAGE**  
**FRONTAL, DROITE**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                      | 9002859 | 9002860 | 9002861 |
|----------|-------------|--|---------|---------|---------|
| 1        | 0031589A-00 | PALETTE NEWTON AJUST COMP 5.5x8po, DROITE - ASSY | 1       | -       | -       |
| 2        | 0031591A-00 | PALETTE NEWTON AJUST COMP 6.5x8po, DROITE - ASSY | -       | 1       | -       |
| 3        | 0031593A-00 | PALETTE NEWTON AJUST COMP 7.5x8po, DROITE - ASSY | -       | -       | 1       |
| 4        | 0031112A-00 | PIVOT PALETTE MONTAGE FRONTAL, DROITE            | 1       | 1       | 1       |

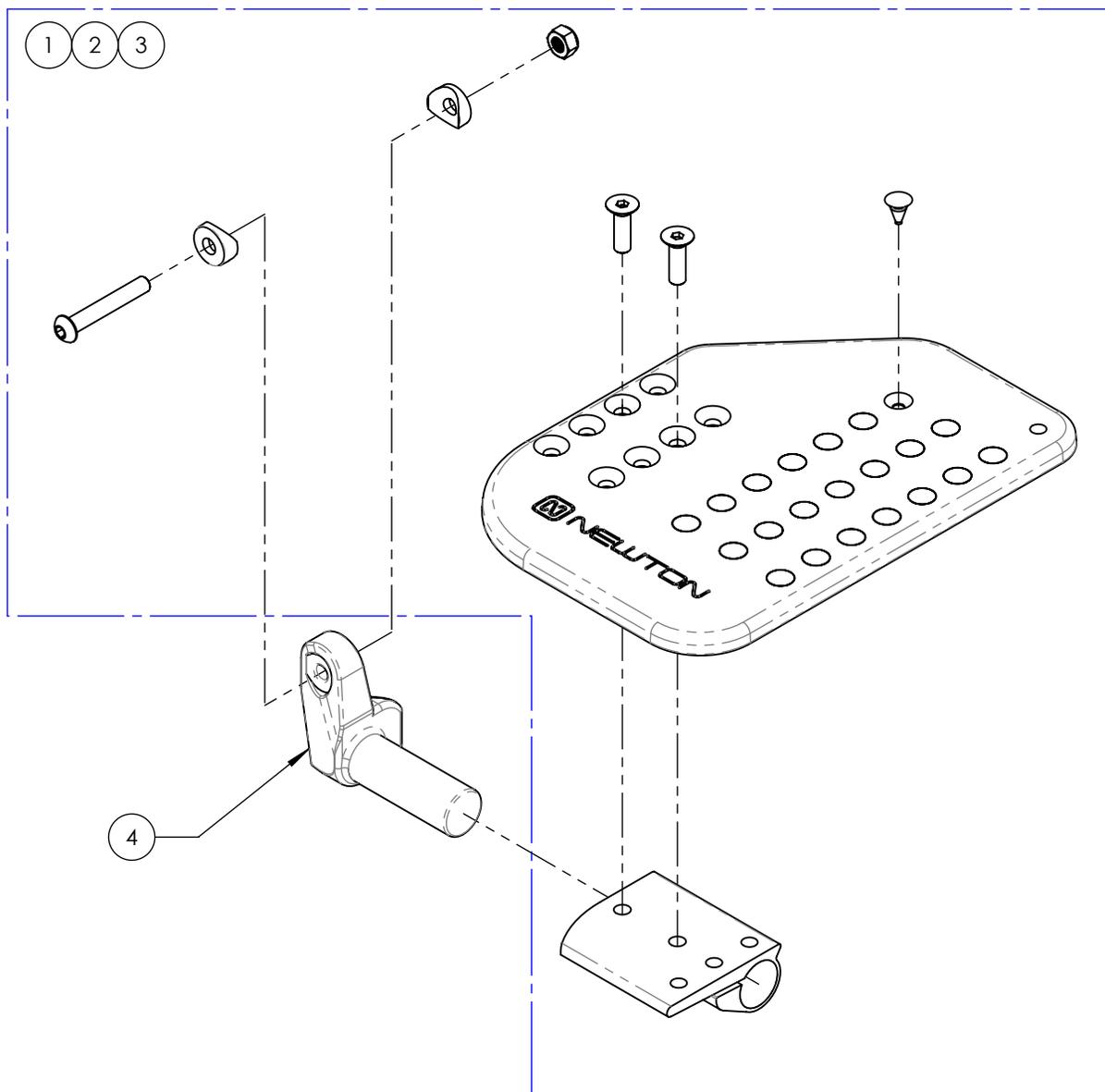


9002859A-00  
 MONTAGE FRONTAL - COMPOSITE,  
 NEWTON, DROITE 5½X8po

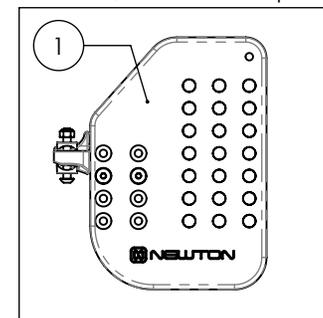

9002860A-00  
 MONTAGE FRONTAL - COMPOSITE,  
 NEWTON, DROITE 6½X8po

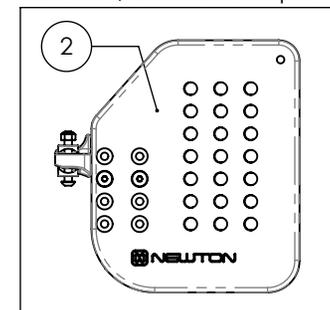


9002861A-00  
 MONTAGE FRONTAL - COMPOSITE,  
 NEWTON, DROITE 7½X8po

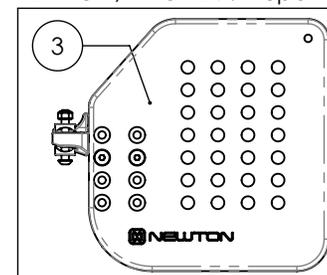


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9002862A 9002864A**  
**PALETTE - PLASTIQUE, NEWTON RÉGLABLE EN ANGLE, MONTAGE**  
**FRONTAL, GAUCHE**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                      | 9002862 | 9002863 | 9002864 |
|----------|-------------|--|---------|---------|---------|
| 1        | 0031590A-00 | PALETTE NEWTON AJUST COMP 5.5x8po, GAUCHE - ASSY | 1       | -       | -       |
| 2        | 0031592A-00 | PALETTE NEWTON AJUST COMP 6.5x8po, GAUCHE - ASSY | -       | 1       | -       |
| 3        | 0031594A-00 | PALETTE NEWTON AJUST COMP 7.5x8po, GAUCHE - ASSY | -       | -       | 1       |
| 4        | 0031113A-00 | PIVOT PALETTE MONTAGE FRONTAL, GAUCHE            | 1       | 1       | 1       |

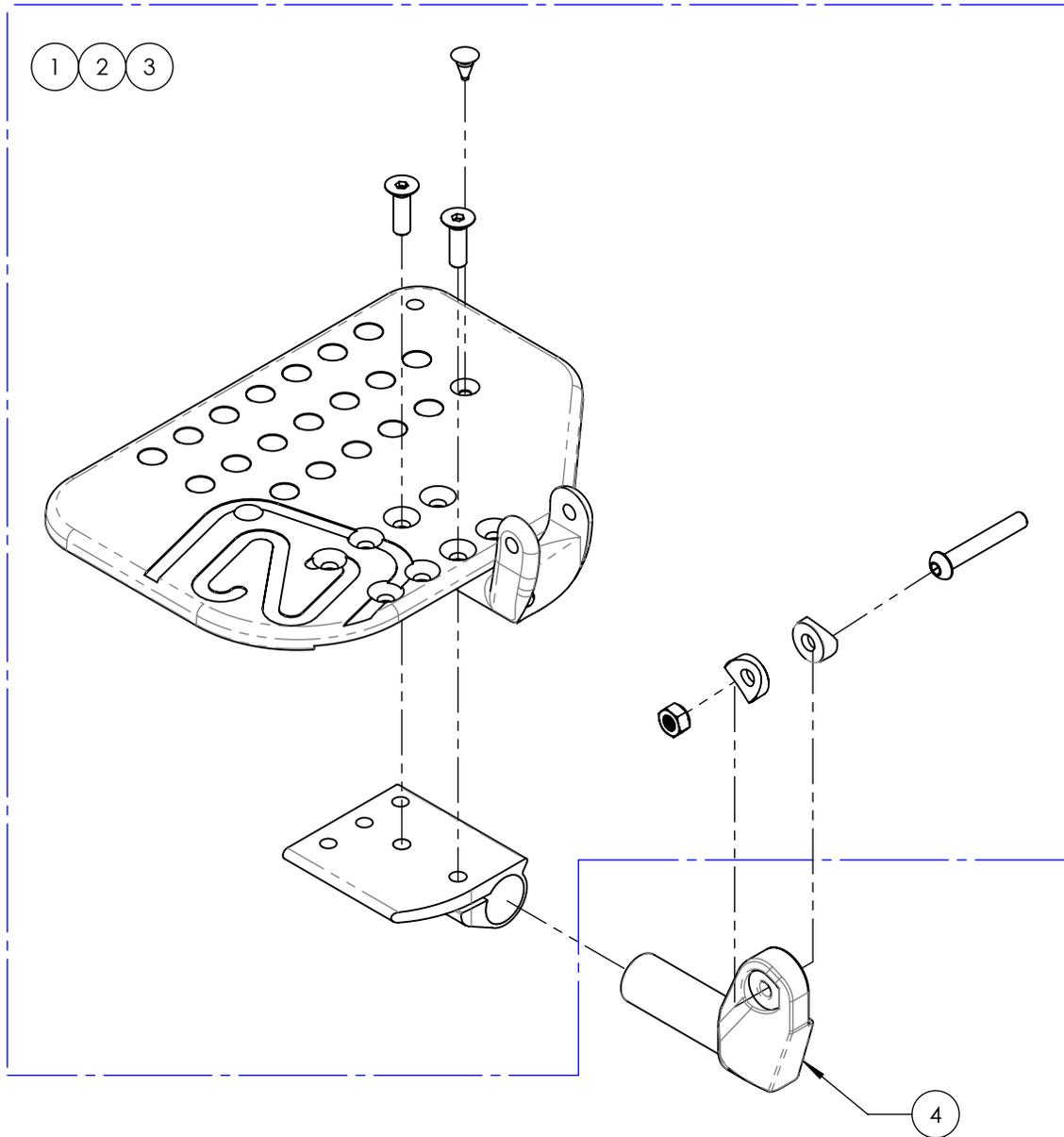


9002862A-00  
 MONTAGE FRONTAL - COMPOSITE, NEWTON,  
 GAUCHE 5½X8po

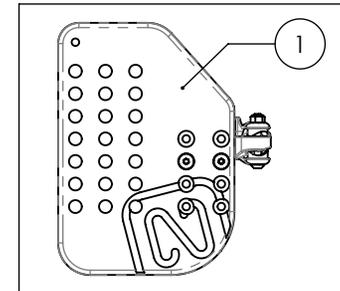

9002863A-00  
 MONTAGE FRONTAL - COMPOSITE, NEWTON,  
 GAUCHE 6½X8po

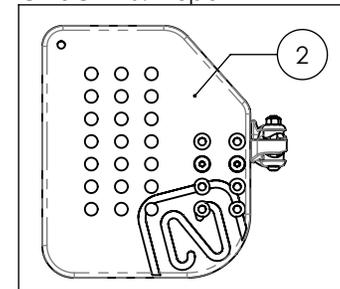


9002864A-00  
 MONTAGE FRONTAL - COMPOSITE, NEWTON,  
 GAUCHE 7½X8po

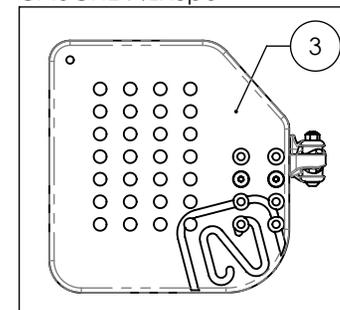


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9002916A & 9003085A  
 APPUI-PIED V2 DROITE, 80° & 90° EXT. LONGUE - NOIR**

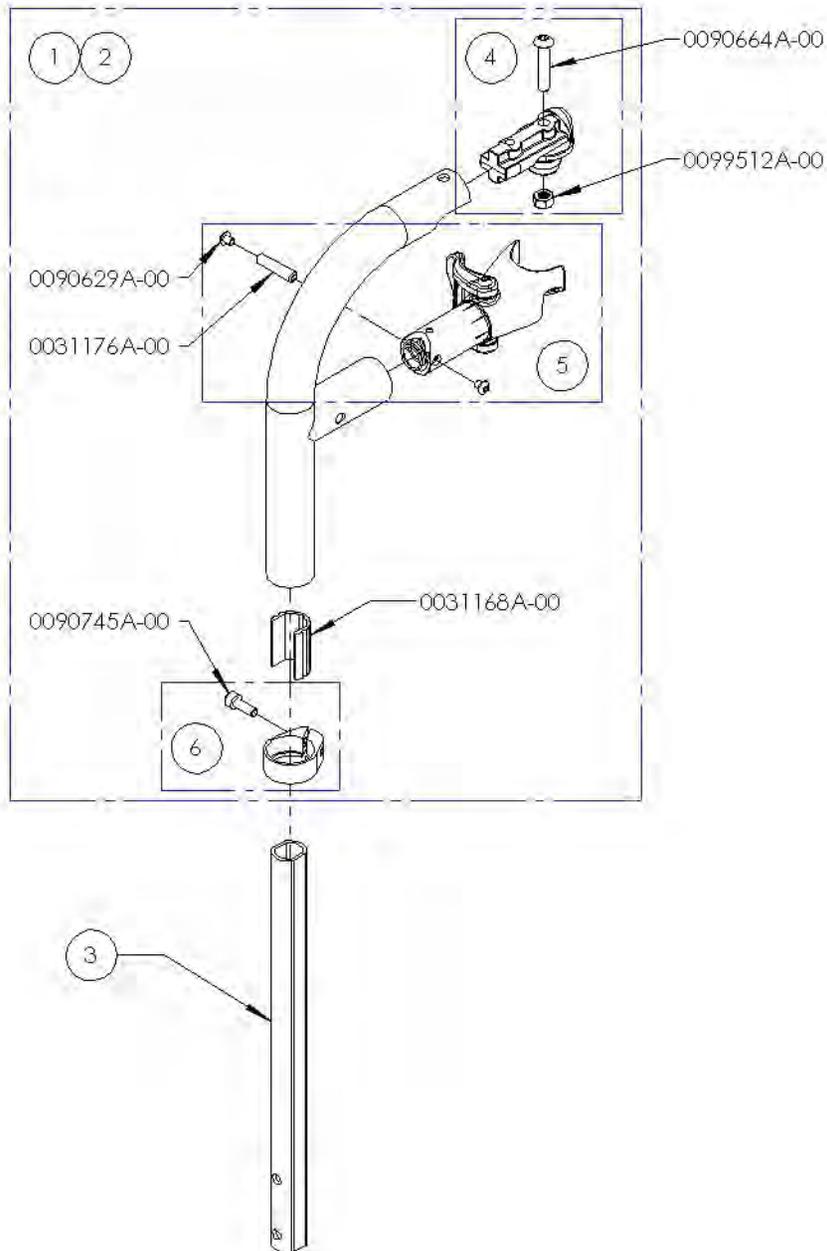


| No. ITEM | No. PIECE   | DESCRIPTION                                       | 9002916A-00 | 9003085A-00 | EXTRA |
|----------|-------------|---|-------------|-------------|-------|
| 1        | 0031647B-00 | APPUI PIED V2 90 DEG, DROITE - ASSEMBLAGE         | 1           | -           | -     |
| 2        | 0031617B-00 | APPUI PIED V2 80 DEG, DROITE - ASSEMBLAGE         | -           | 1           | -     |
| 3        | 0031209A-00 | EXTENSION 90 DEG LONGUE APPUI PIED V2             | 1           | 1           | -     |
| 4        | 0031651B-00 | PIVOT APPUI PIED V2 - ASSEMBLAGE                  | -           | -           | 1     |
| 5        | 0031650A-00 | BATI APPUI PIED V2 DROIT - ASSEMBLAGE             | -           | -           | 1     |
| 6        | 0031552A-00 | BAGUE EXTENSION DROITE APPUI PIED V2 - ASSEMBLAGE | -           | -           | 1     |

9002916A-00 -  
 APPUI-PIED V2, DROITE, 90°, EXT.  
 LONGUE - NOIR

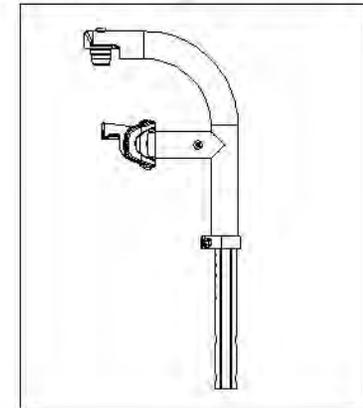


9003085A-00 -  
 APPUI-PIED V2, DROITE, 80°, EXT.  
 LONGUE - NOIR

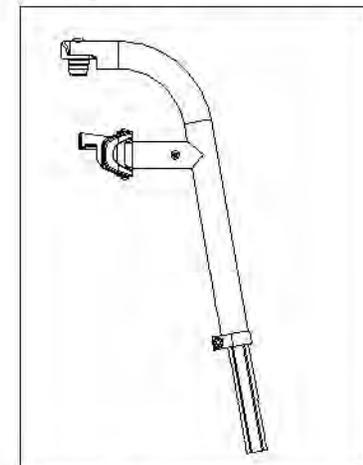


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9002917A & 9003086A**  
**APPUI-PIED V2 GAUCHE 80° & 90°, EXT. LONGUE - NOIR**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                       | 9002917A-00 | 9003086A-00 | EXTRA |
|----------|-------------|---|-------------|-------------|-------|
| 1        | 0031548B-00 | APPUI PIED V2 90 DEG, GAUCHE - ASSEMBLAGE         | 1           | -           | -     |
| 2        | 0031618B-00 | APPUI PIED V2 80 DEG, GAUCHE - ASSEMBLAGE         | -           | 1           | -     |
| 3        | 0031209A-00 | EXTENSION 90 DEG LONGUE APPUI PIED V2             | 1           | 1           | -     |
| 4        | 0031551B-00 | PIVOT APPUI PIED V2 - ASSEMBLAGE                  | -           | -           | 1     |
| 5        | 0031549A-00 | BATI APPUI PIED V2 GAUCHE - ASSEMBLAGE            | -           | -           | 1     |
| 6        | 0031553A-00 | BAGUE EXTENSION GAUCHE APPUI PIED V2 - ASSEMBLAGE | -           | -           | 1     |

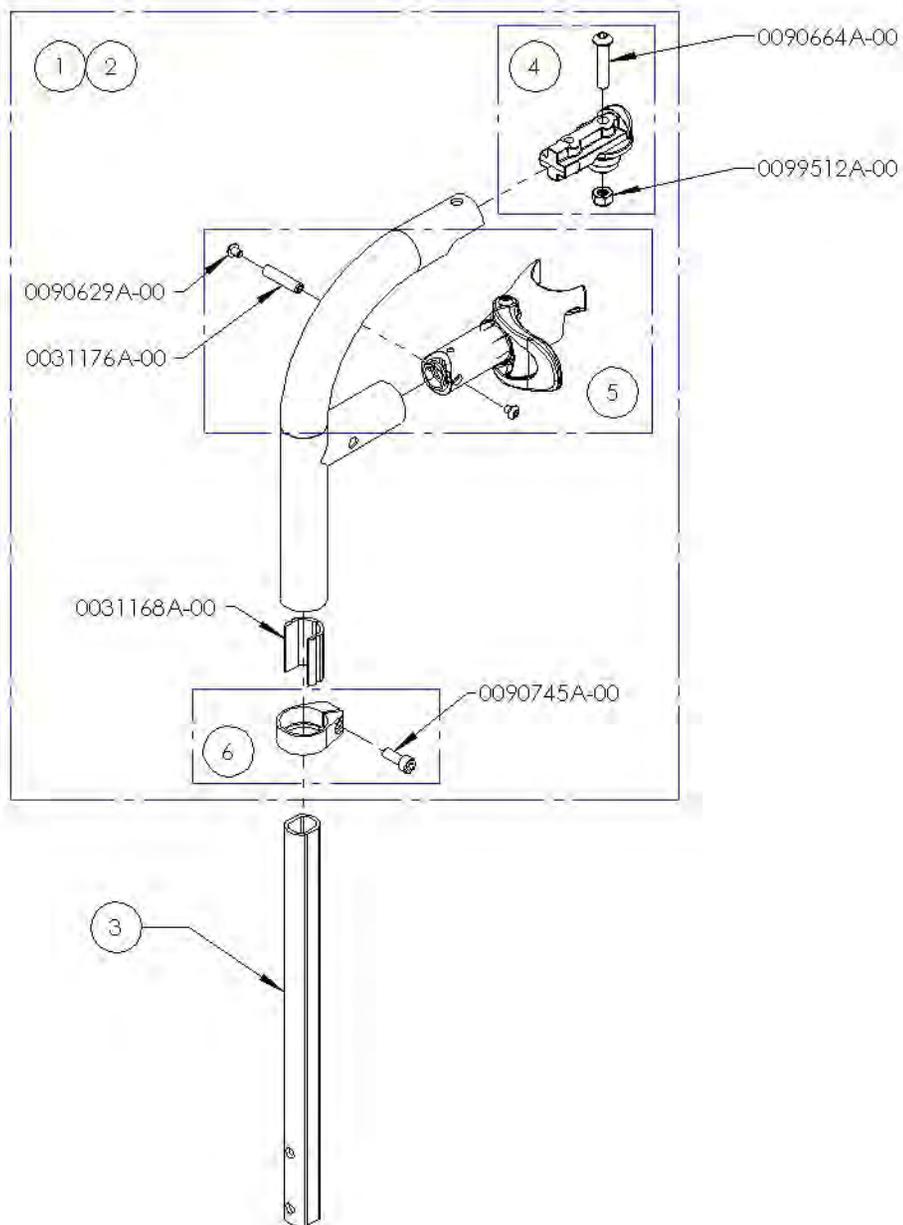

9002917A-00  
 APPUI-PIED V2, GAUCHE, 90°, EXT.  
 LONGUE - NOIR

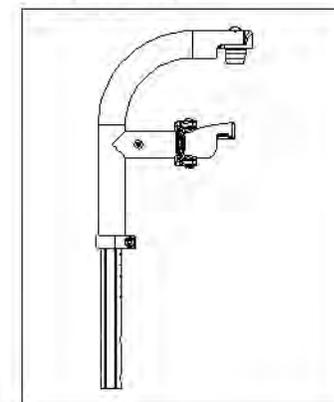


9003086A-00  
 APPUI-PIED V2, GAUCHE, 80°, EXT.  
 LONGUE - NOIR

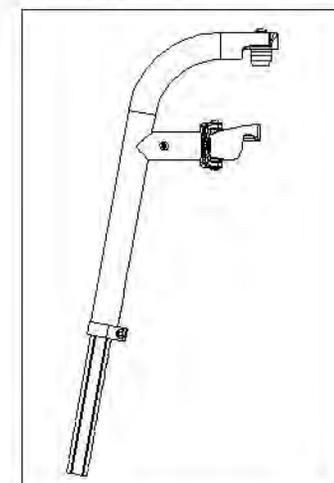

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


**9002946A\_9002947A**

**APPUI-PIED V2 DROITE 60° & 70°, EXT. COURTE - NOIR**

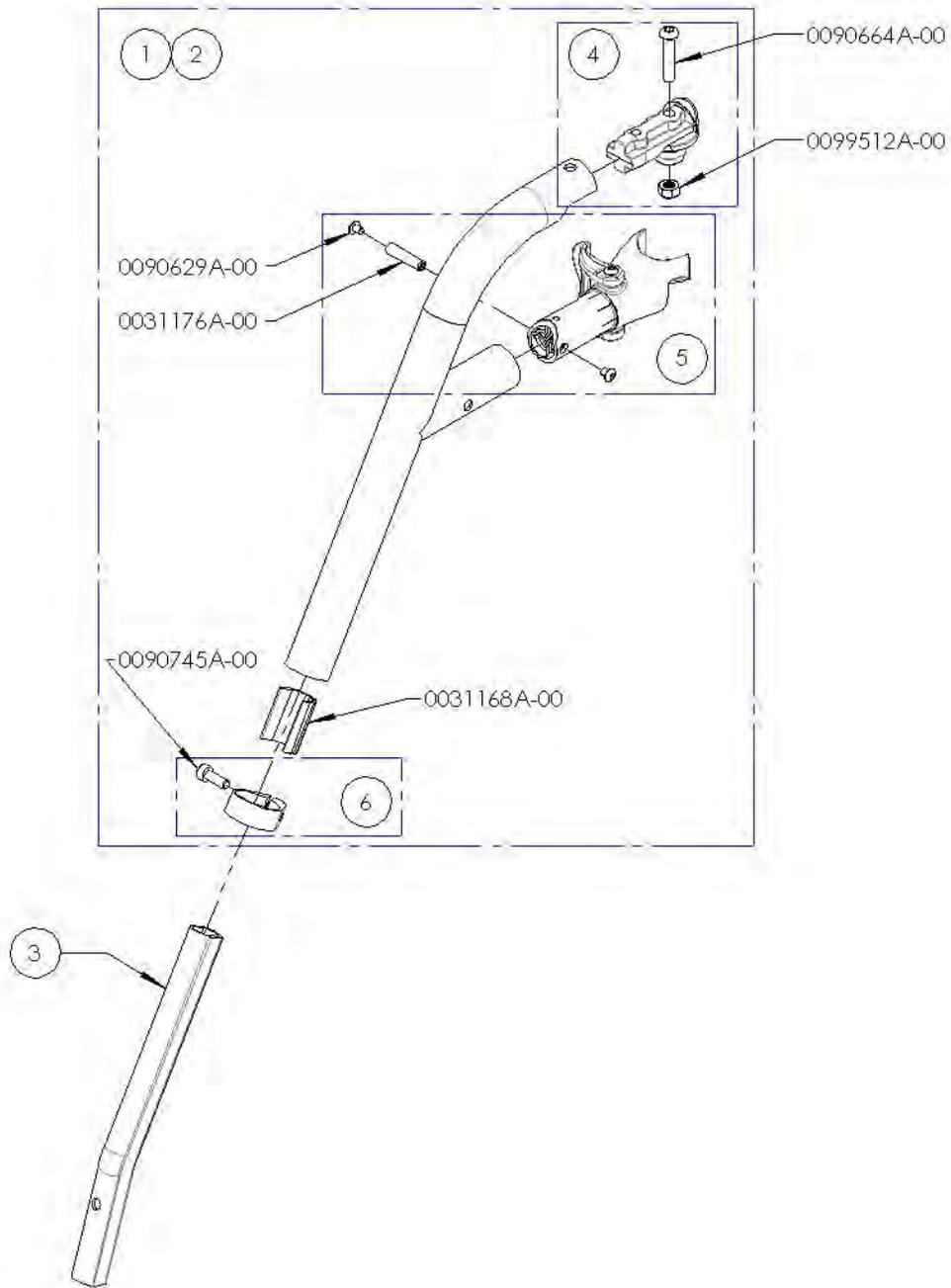


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                       | 9002946A-00 | 9002947A-00 | EXTRA |
|----------|-------------|---|-------------|-------------|-------|
| 1        | 0031643B-00 | APPUI PIED V2 60 DEG, DROITE - ASSEMBLAGE         | 1           | -           | -     |
| 2        | 0031645B-00 | APPUI PIED V2 70 DEG, DROITE - ASSEMBLAGE         | -           | 1           | -     |
| 3        | 0031154A-00 | EXTENSION COURTE APPUI PIED V2                    | 1           | 1           | -     |
| 4        | 0031551B-00 | PIVOT APPUI PIED V2 - ASSEMBLAGE                  | -           | -           | 1     |
| 5        | 0031650A-00 | BATI APPUI PIED V2 DROIT - ASSEMBLAGE             | -           | -           | 1     |
| 6        | 0031552A-00 | BAGUE EXTENSION DROITE APPUI PIED V2 - ASSEMBLAGE | -           | -           | 1     |

9002946A-00 -  
APPUI-PIED V2, DROITE, 60°, EXT.  
COURTE - NOIR

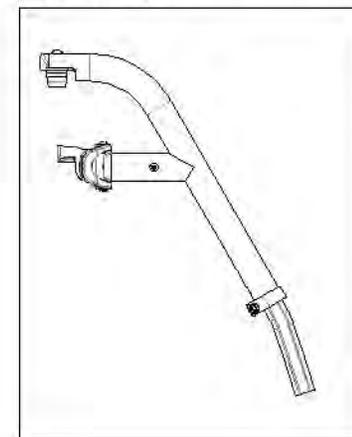


9002947A-00 -  
APPUI-PIED V2, DROITE, 70°, EXT.  
COURTE - NOIR

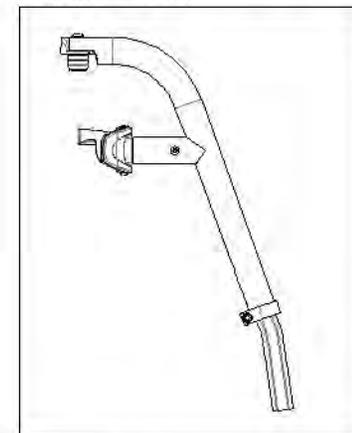

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


**9002948A\_9002949A**

**APPUI-PIED V2 GAUCHE 60° & 70°, EXT. COURTE - NOIR**

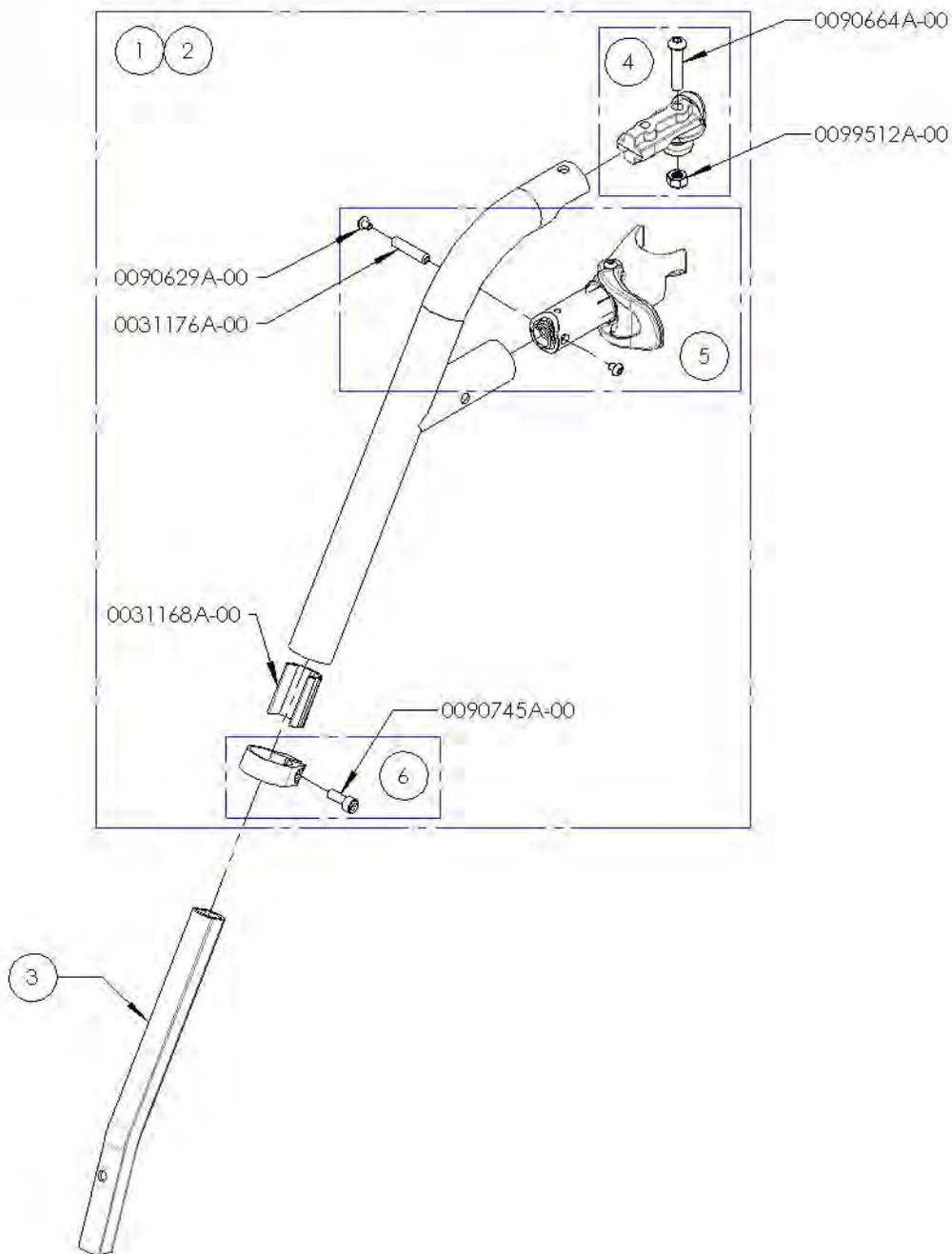


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                       | 9002948A-00 | 9002949A-00 | EXTRA |
|----------|-------------|---|-------------|-------------|-------|
| 1        | 0031544B-00 | APPUI PIED V2 60 DEG, GAUCHE - ASSEMBLAGE         | 1           | -           | -     |
| 2        | 0031546B-00 | APPUI PIED V2 70 DEG, GAUCHE - ASSEMBLAGE         | -           | 1           | -     |
| 3        | 0031154A-00 | EXTENSION COURTE APPUI PIED V2                    | 1           | 1           | -     |
| 4        | 0031551B-00 | PIVOT APPUI PIED V2 - ASSEMBLAGE                  | -           | -           | 1     |
| 5        | 0031549A-00 | BATI APPUI PIED V2 GAUCHE - ASSEMBLAGE            | -           | -           | 1     |
| 6        | 0031553A-00 | BAGUE EXTENSION GAUCHE APPUI PIED V2 - ASSEMBLAGE | -           | -           | 1     |

9002948A-00 -  
APPUI-PIED V2, GAUCHE, 60°, EXT.  
COURTE - NOIR


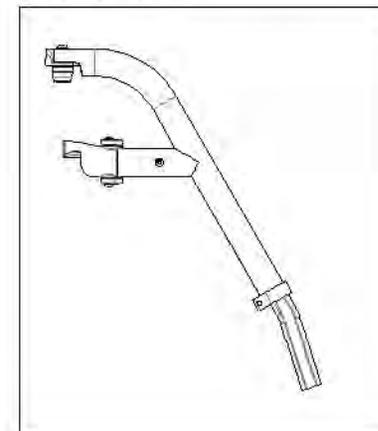


9002949A-00 -  
APPUI-PIED V2, GAUCHE, 70°, EXT.  
COURTE - NOIR

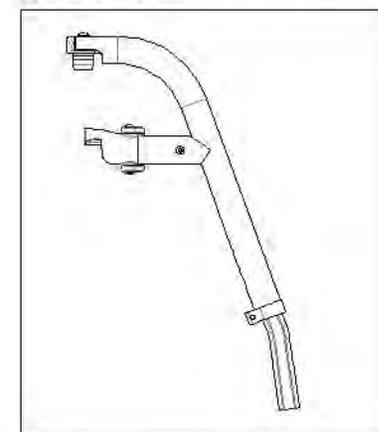

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES



| ITEM NO. | PARTNO      | DESCRIPTION                               | QTY |
|----------|-------------|---|-----|
| 1        | 0031247A-00 | V2 FOOTREST PIVOT EXTENSION               | 1   |
| 2        | 0090665A-00 | BUTTON CAP SCREW M6x1x35mm L, 24mm THREAD | 1   |

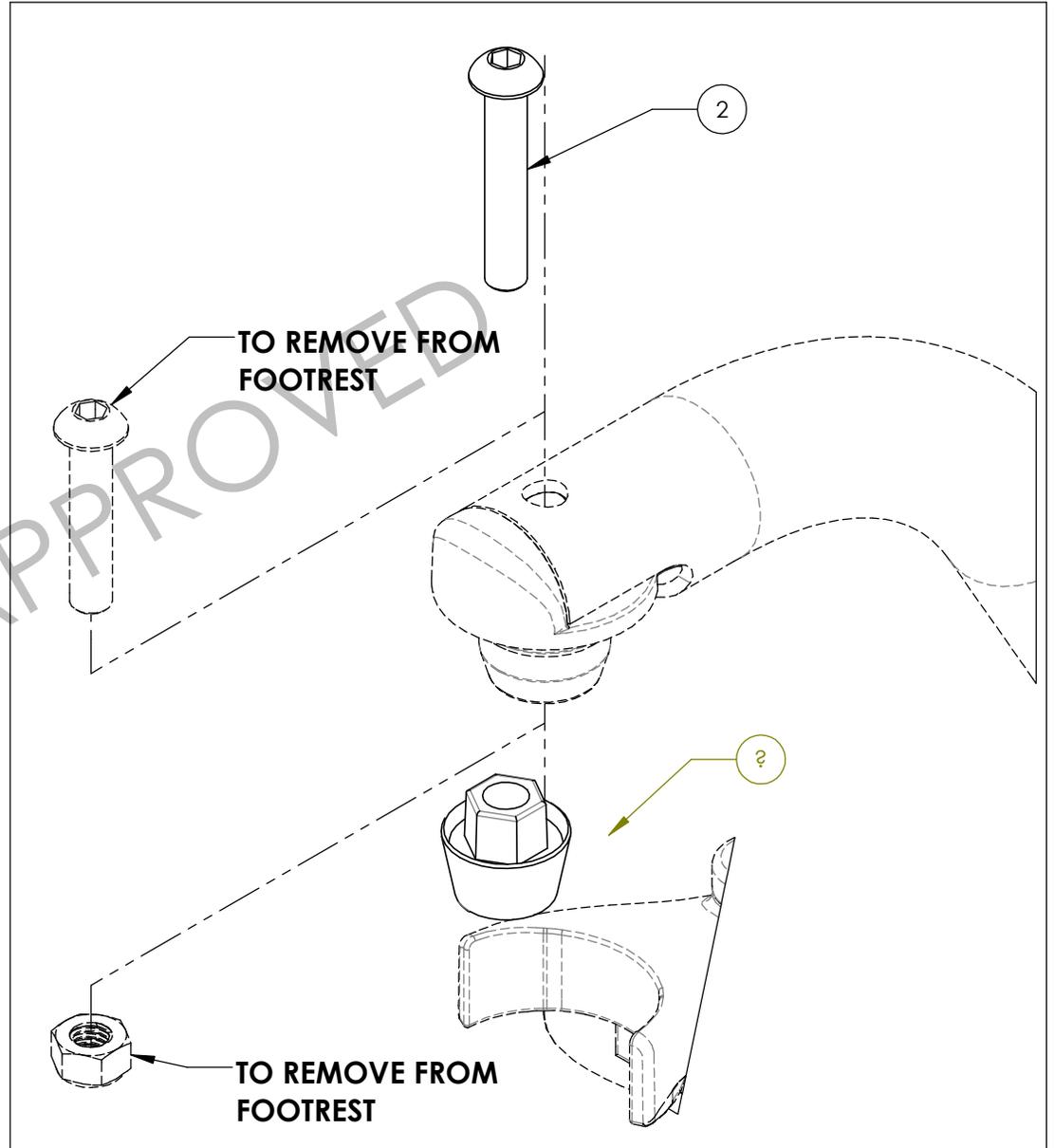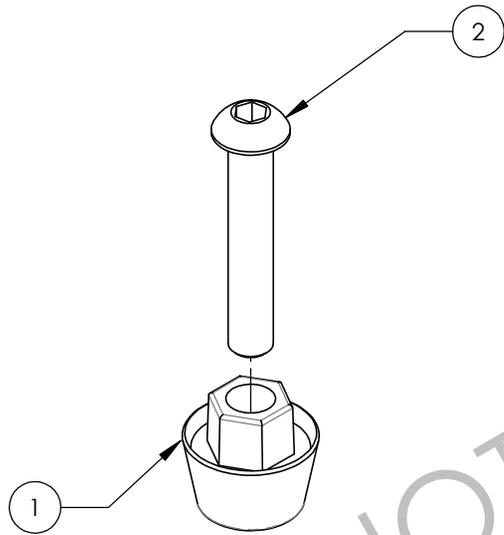

MAKE SURE TO HAVE YOUR SERIAL NUMBER NEARBY WHEN ORDERING PARTS FOR YOUR MOTION COMPOSITES WHEELCHAIR

**9003079A-00**  
**APPUI-PIED - KIT EXTENSION POUR PIVOT**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                             | QTÉ |
|----------|-------------|---|-----|
| 1        | 0031247A-00 | EXTENSION PIVOT APPUI PIED V2           | 1   |
| 2        | 0090665A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M6x1x35mm L, 24mm FILET | 1   |

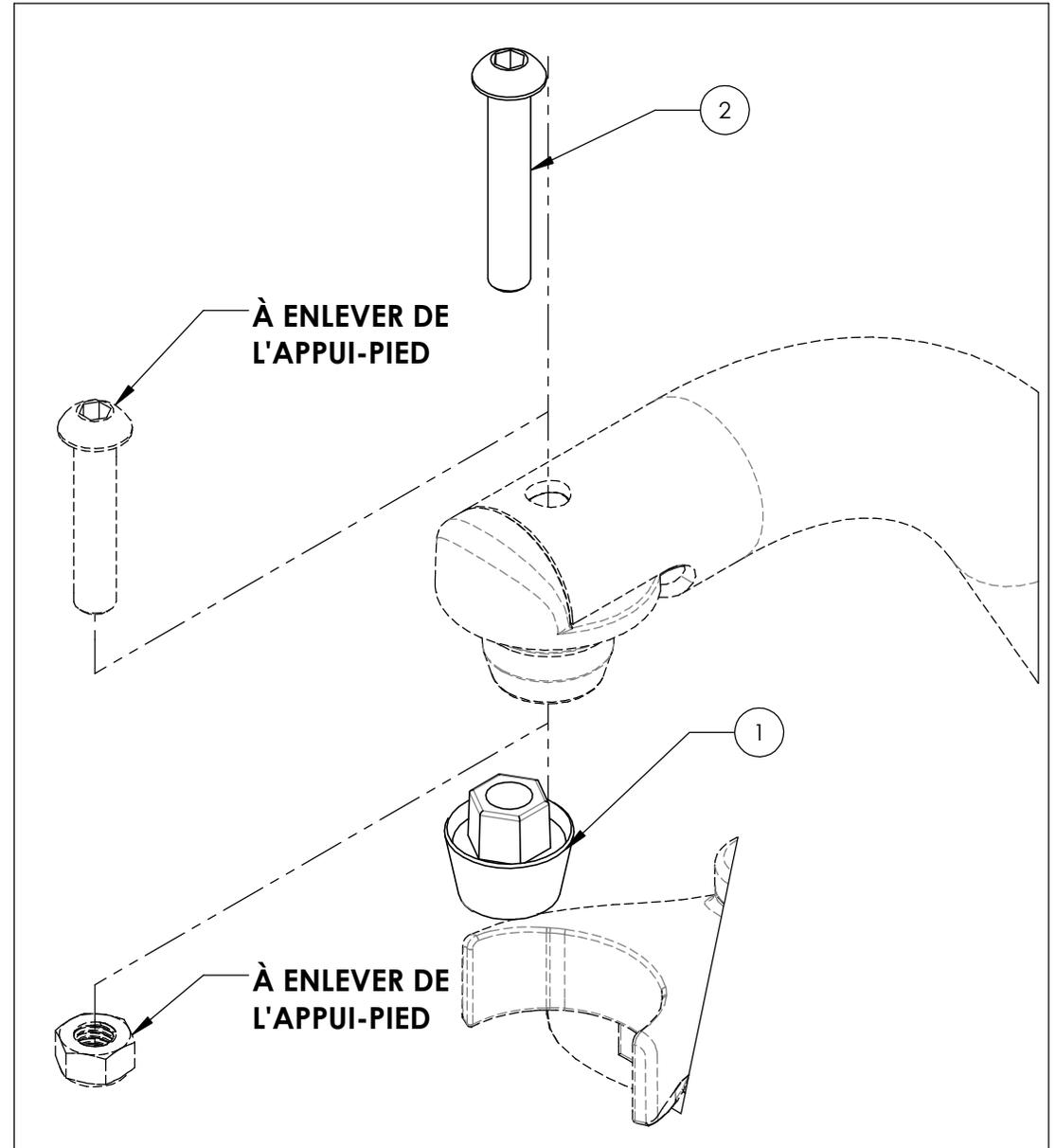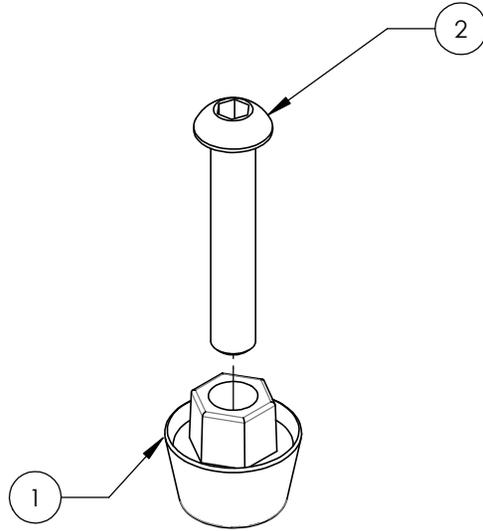

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9007669A-00**  
**TUBE DE BASE - PALETTE PLEINE LARGEUR RABATTABLE**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                              | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 1        | 0031561A-00 | TUBE PLATEFORME V2 521mm - ASSY          | 1   |
| 2        | 0031116A-00 | EXTRUSION SIMPLE PALETTE AJUSTABLE ANGLE | 2   |
| 3        | 0090868A-00 | VIS TÊTE FRAISÉE M6x1x20mm L             | 2   |

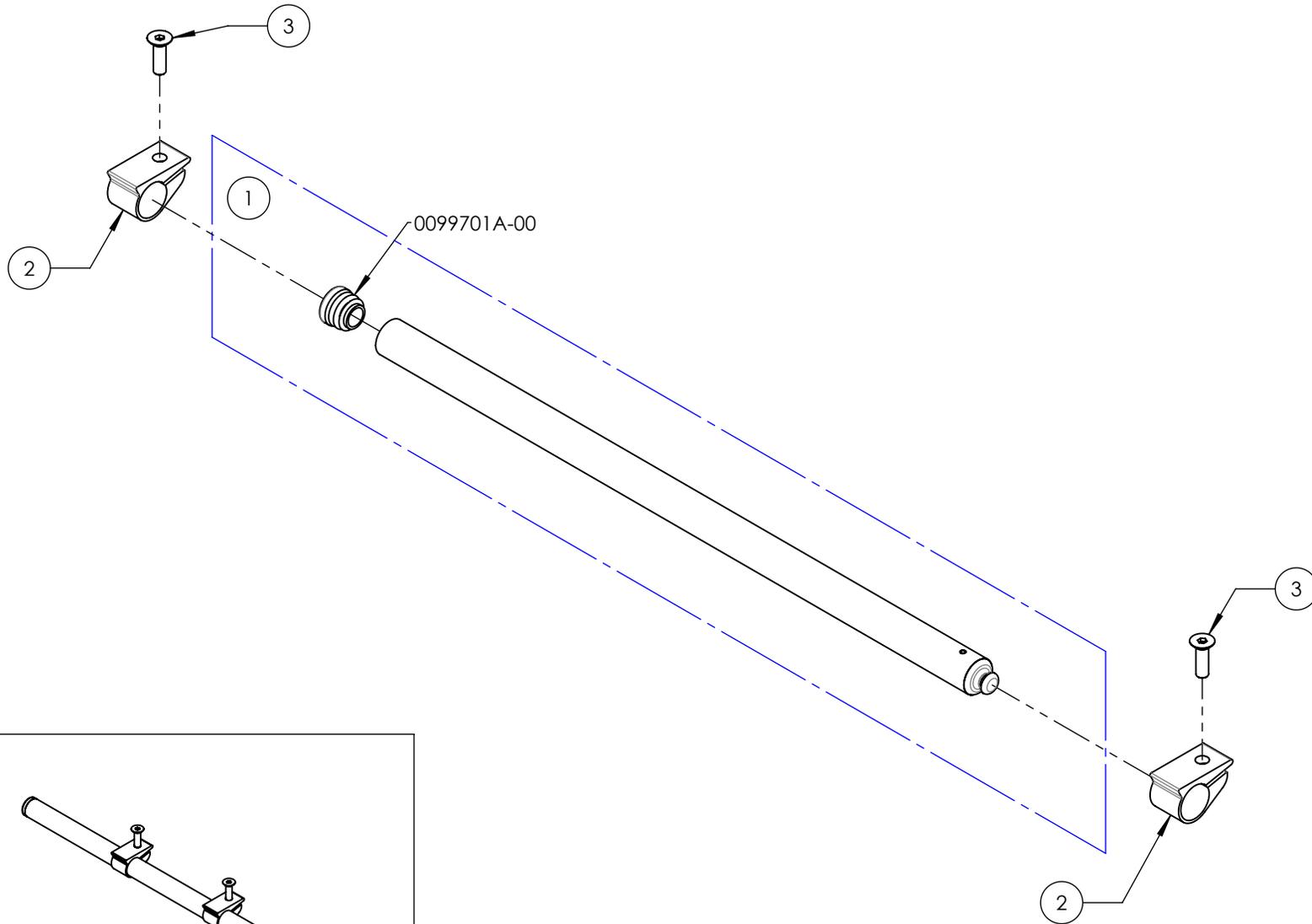


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES




**9007927B 9007929B**  
**AJE - V2, GAUCHE & PALETTE STD**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                              | 9007927 | 9007928 | 9007929 | REPLACEMENT PIÈCES |
|----------|-------------|--|---------|---------|---------|--------------------|
| 1        | 0031565B-00 | APPUI PIED ELEVATEUR V2 GAUCHE           | 1       | 1       | 1       | -                  |
| 2        | 0031141A-00 | COUSSIN APPUI-MOLLET ELR 14-16po, GAUCHE | 1       | -       | -       | -                  |
| 3        | 0031143A-00 | COUSSIN APPUI-MOLLET ELR 17-22po, GAUCHE | -       | 1       | 1       | -                  |
| 4        | 0031025A-00 | PALETTE COMPOSITE 6x6po - ASSY           | 1       | -       | -       | -                  |
| 5        | 0031026A-00 | PALETTE COMPOSITE 7x6po - ASSY           | -       | 1       | -       | -                  |
| 6        | 0031027A-00 | PALETTE COMPOSITE 8x6po - ASSY           | -       | -       | 1       | -                  |
| 7        | 0031549A-00 | BATI APPUI PIED V2 GAUCHE- ASSEMBLAGE    | -       | -       | -       | 1                  |
| 8        | 0031551B-00 | PIVOT APPUI PIED V2 - ASSEMBLAGE         | -       | -       | -       | 1                  |
| 9        | 0031158A-00 | SUPPORT DE COUSSIN POUR APPUI-MOLLET     | -       | -       | -       | 1                  |

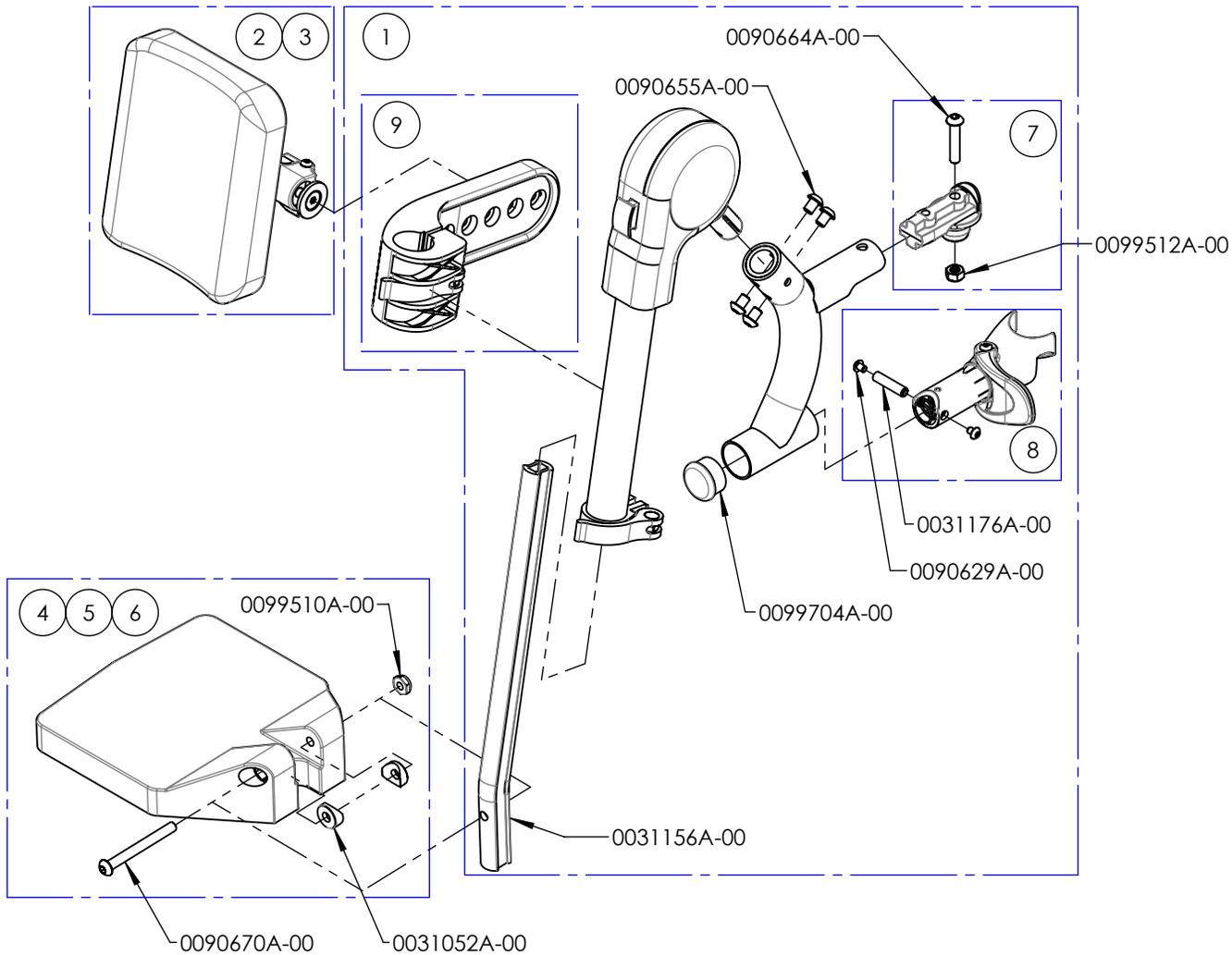


9007927B-00  
 AJE - V2, GAUCHE &  
 PALETTE STD 6x6po

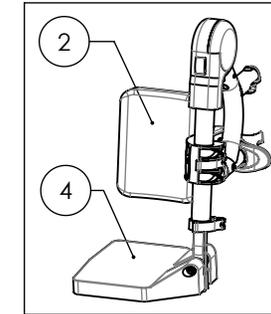

9007928B-00  
 AJE - V2, GAUCHE &  
 PALETTE STD 7x6po

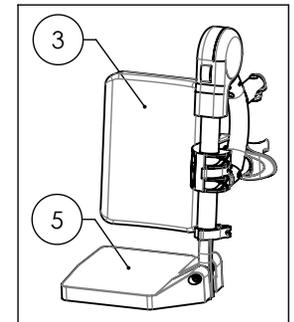


9007929B-00  
 AJE - V2, GAUCHE &  
 PALETTE STD 8x6po

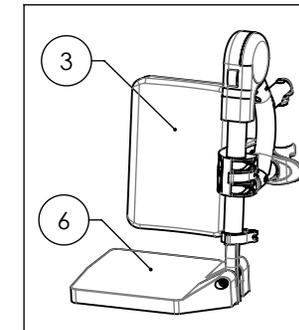


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9008305B 9008309B  
APP-MOIGNON PLAT PIVOT INT & EXT DROITE**


| ITEM NO. | PARTNO      | DESCRIPTION                              | 9008305 | 9008306 | 9008307 | 9008308 | REMPLACEMENT PIÈCES |
|----------|-------------|--|---------|---------|---------|---------|---------------------|
| 1        | 0001585A-00 | RESIDUAL LIMB SUPPORT FLAT PAD 6x8in     | 1       | -       | -       | -       | -                   |
| 2        | 0001585A-01 | RESIDUAL LIMB SUPPORT FLAT PAD 8X10in    | -       | 1       | -       | -       | -                   |
| 3        | 0001585A-02 | RESIDUAL LIMB SUPPORT FLAT PAD 10X10in   | -       | -       | 1       | -       | -                   |
| 4        | 0001585A-03 | RESIDUAL LIMB SUPPORT FLAT PAD 10X14in   | -       | -       | -       | 1       | -                   |
| 5        | 0031581B-00 | V2 UNIVERSAL LEGREST HANGER RIGHT - ASSY | 1       | 1       | 1       | 1       | -                   |
| 6        | 0000899A-00 | WELD T-TUBE - ASSY                       | 1       | 1       | 1       | 1       | -                   |
| 7        | 0000870A-00 | DOUBLE HINGE CLAMP - ASSY                | 1       | 1       | 1       | 1       | -                   |
| 8        | 0099564A-00 | FLAT WASHER M5                           | 4       | 4       | 4       | 4       | -                   |
| 9        | 0000883A-00 | LIMB SUPPORT TOP CLAMP                   | 1       | 1       | 1       | 1       | -                   |
| 10       | 0090745A-00 | SOCKET CAP SCREW M5x0.8x14mm L           | 2       | 2       | 2       | 2       | -                   |
| 11       | 0090647A-00 | BUTTON CAP SCREW M5x0.8x18mm L           | 4       | 4       | 4       | 4       | -                   |
| 12       | 0031551B-00 | V2 FOOTREST PIVOT - ASSEMBLY             | -       | -       | -       | -       | 1                   |
| 13       | 0031550A-00 | V2 FOOTREST HOUSING RIGHT- ASSEMBLY      | -       | -       | -       | -       | 1                   |

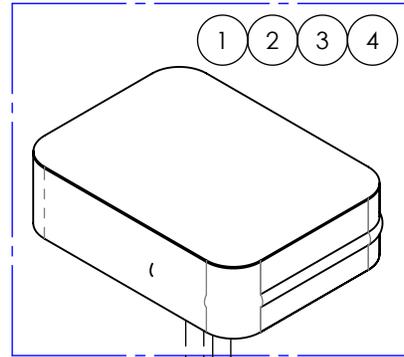


9008305B-00  
APP-MOIGNON PLAT PIVOT INT & EXT  
DROITE 6x8po

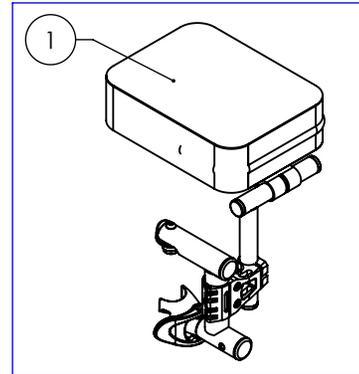



9008306B-00  
APP-MOIGNON PLAT PIVOT INT & EXT  
DROITE 8x10po

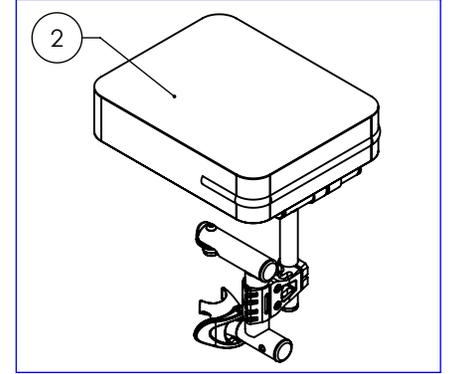

9008307B-00  
APP-MOIGNON PLAT PIVOT INT & EXT  
DROITE 10x10po

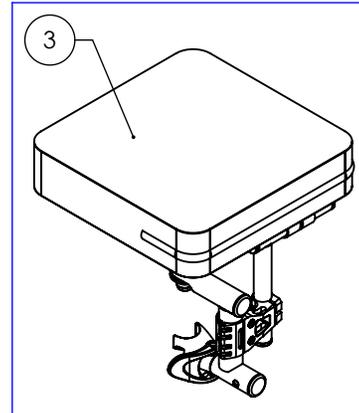


9008308B-00  
APP-MOIGNON PLAT PIVOT INT & EXT  
DROITE 10x14po

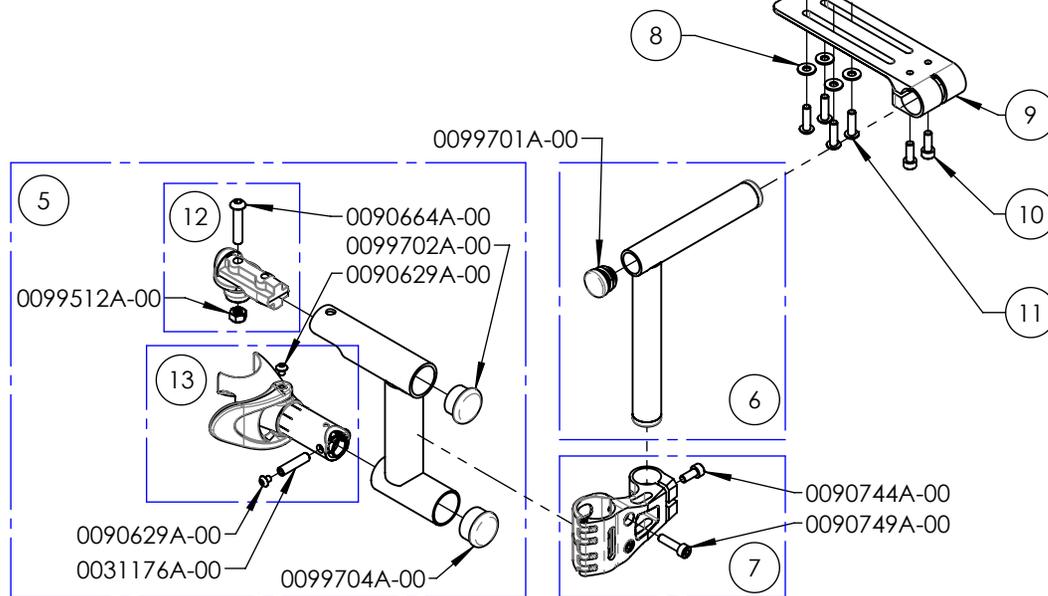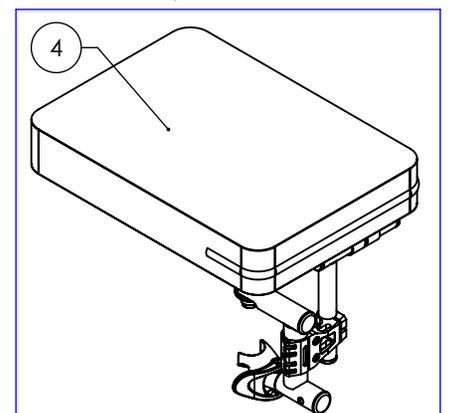


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9008310B 9008314B**  
**APP-MOIGNON PLAT PIVOT INT & EXT GAUCHE**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                           | 9008310 | 9008311 | 9008312 | 9008313 | REMPLACEMENT PIÈCES |
|----------|-------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------|
| 1        | 0001585A-00 | COUSSIN PLAT APPUI-MOIGNON 6x8po      | 1       | -       | -       | -       | -                   |
| 2        | 0001585A-01 | COUSSIN PLAT APPUI-MOIGNON 8x10po     | -       | 1       | -       | -       | -                   |
| 3        | 0001585A-02 | COUSSIN PLAT APPUI-MOIGNON 10x10po    | -       | -       | 1       | -       | -                   |
| 4        | 0001585A-03 | COUSSIN PLAT APPUI-MOIGNON 10x14po    | -       | -       | -       | 1       | -                   |
| 5        | 0031580B-00 | BATI APPUI PIED UNIV V2 GAUCHE - ASSY | 1       | 1       | 1       | 1       | -                   |
| 6        | 0000899A-00 | TUBE EN T SOUDÉ - ASSY                | 1       | 1       | 1       | 1       | -                   |
| 7        | 0000870A-00 | BAGUE À DOUBLE PENTURE - ASSY         | 1       | 1       | 1       | 1       | -                   |
| 8        | 0099564A-00 | RONDELLE M5                           | 4       | 4       | 4       | 4       | -                   |
| 9        | 0000883A-00 | BAGUE SUP. APPUI-MOIGNON              | 1       | 1       | 1       | 1       | -                   |
| 10       | 0090745A-00 | VIS TÊTE CYLIND M5x0.8x14mm L         | 2       | 2       | 2       | 2       | -                   |
| 11       | 0090647A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M5x0.8x18mm L         | 4       | 4       | 4       | 4       | -                   |
| 12       | 0031551B-00 | PIVOT APPUI PIED V2 - ASSEMBLAGE      | -       | -       | -       | -       | 1                   |
| 13       | 0031549A-00 | BATI APPUI PIED V2 GAUCHE- ASSEMBLAGE | -       | -       | -       | -       | 1                   |

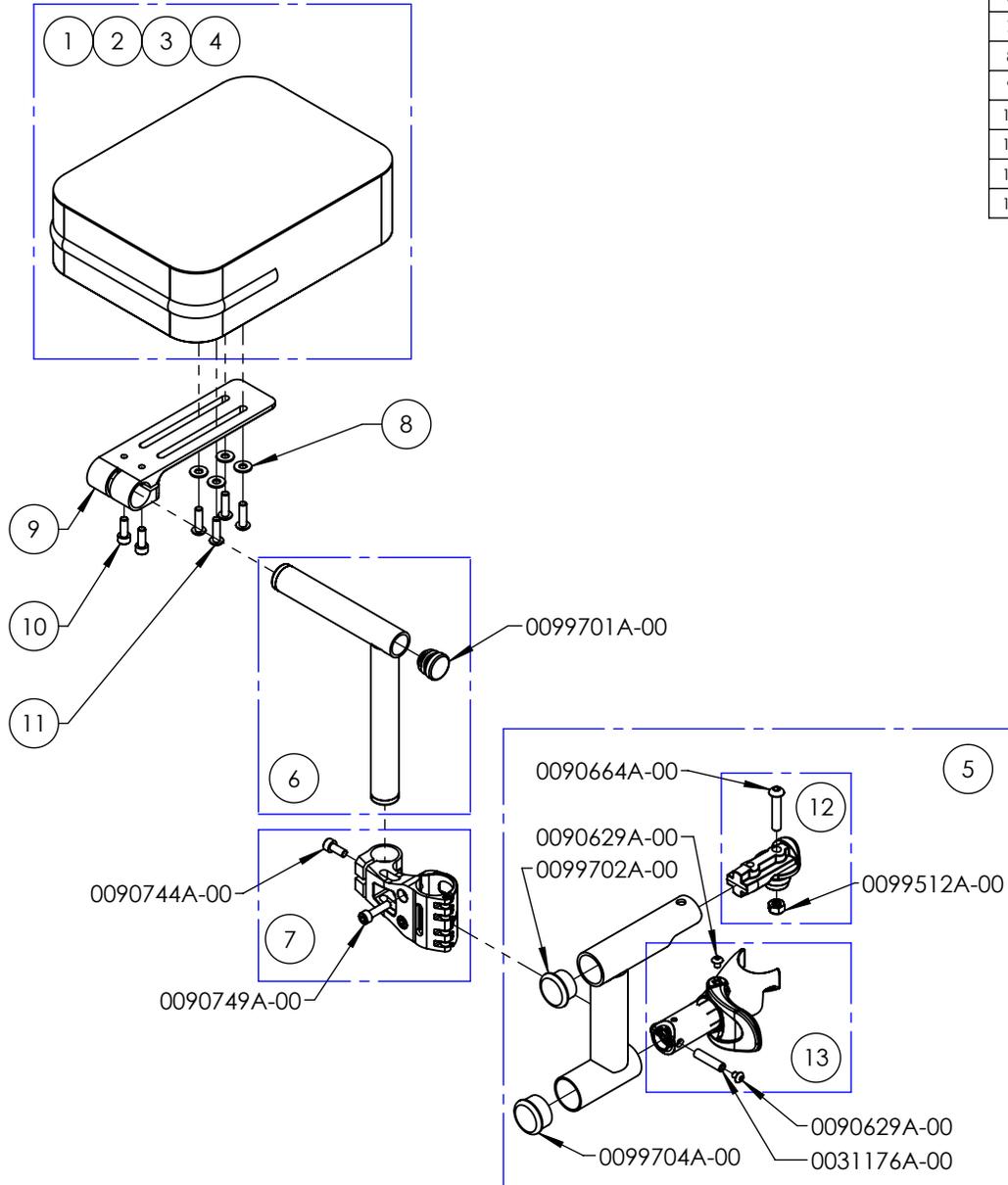


9008310B-00  
 APP-MOIGNON PLAT PIVOT INT & EXT  
 GAUCHE 6x8po

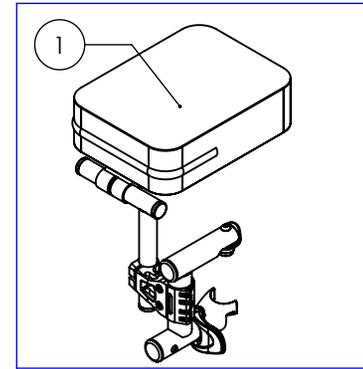


9008311B-00  
 APP-MOIGNON PLAT PIVOT INT & EXT  
 GAUCHE 8x10po

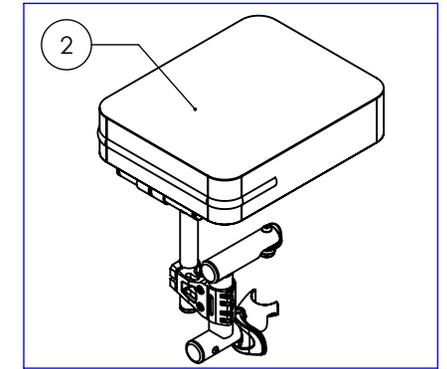

9008312B-00  
 APP-MOIGNON PLAT PIVOT INT & EXT  
 GAUCHE 10x10po

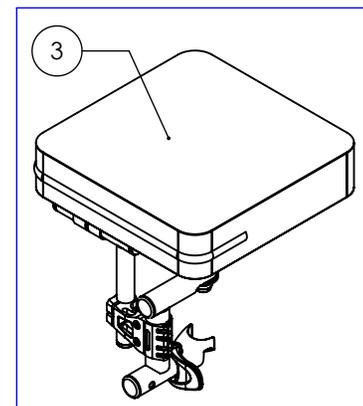


9008313B-00  
 APP-MOIGNON PLAT PIVOT INT & EXT  
 GAUCHE 10x14po

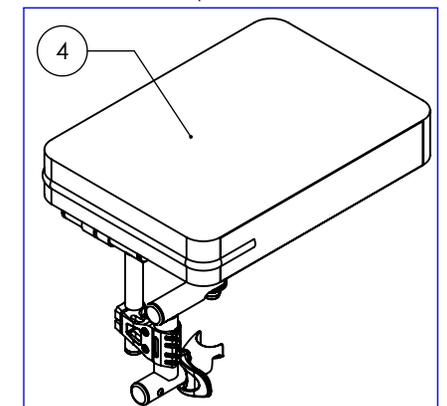


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9008319B 9008320B**  
**APP-MOIGNON PROFILÉ PIVOT INT & EXT DROITE**


| ITEM NO. | PARTNO      | DESCRIPTION                                | 9008319 | 9008320 | REPLACEMENT PIÈCES |
|----------|-------------|--|---------|---------|--------------------|
| 1        | 0001032A-00 | RESIDUAL LIMB SUPPORT CONTOURED PAD 6x8in  | 1       | -       | -                  |
| 2        | 0001032A-01 | RESIDUAL LIMB SUPPORT CONTOURED PAD 8x10in | -       | 1       | -                  |
| 3        | 0031581B-00 | V2 UNIVERSAL LEGREST HANGER RIGHT - ASSY   | 1       | 1       | -                  |
| 4        | 0000899A-00 | WELD T-TUBE - ASSY                         | 1       | 1       | -                  |
| 5        | 0000870A-00 | DOUBLE HINGE CLAMP - ASSY                  | 1       | 1       | -                  |
| 6        | 0099564A-00 | FLAT WASHER M5                             | 4       | 4       | -                  |
| 7        | 0000883A-00 | LIMB SUPPORT TOP CLAMP                     | 1       | 1       | -                  |
| 8        | 0090745A-00 | SOCKET CAP SCREW M5x0.8x14mm L             | 2       | 2       | -                  |
| 9        | 0090647A-00 | BUTTON CAP SCREW M5x0.8x18mm L             | 4       | 4       | -                  |
| 10       | 0031551B-00 | V2 FOOTREST PIVOT - ASSEMBLY               | -       | -       | 1                  |
| 11       | 0031550A-00 | V2 FOOTREST HOUSING RIGHT- ASSEMBLY        | -       | -       | 1                  |

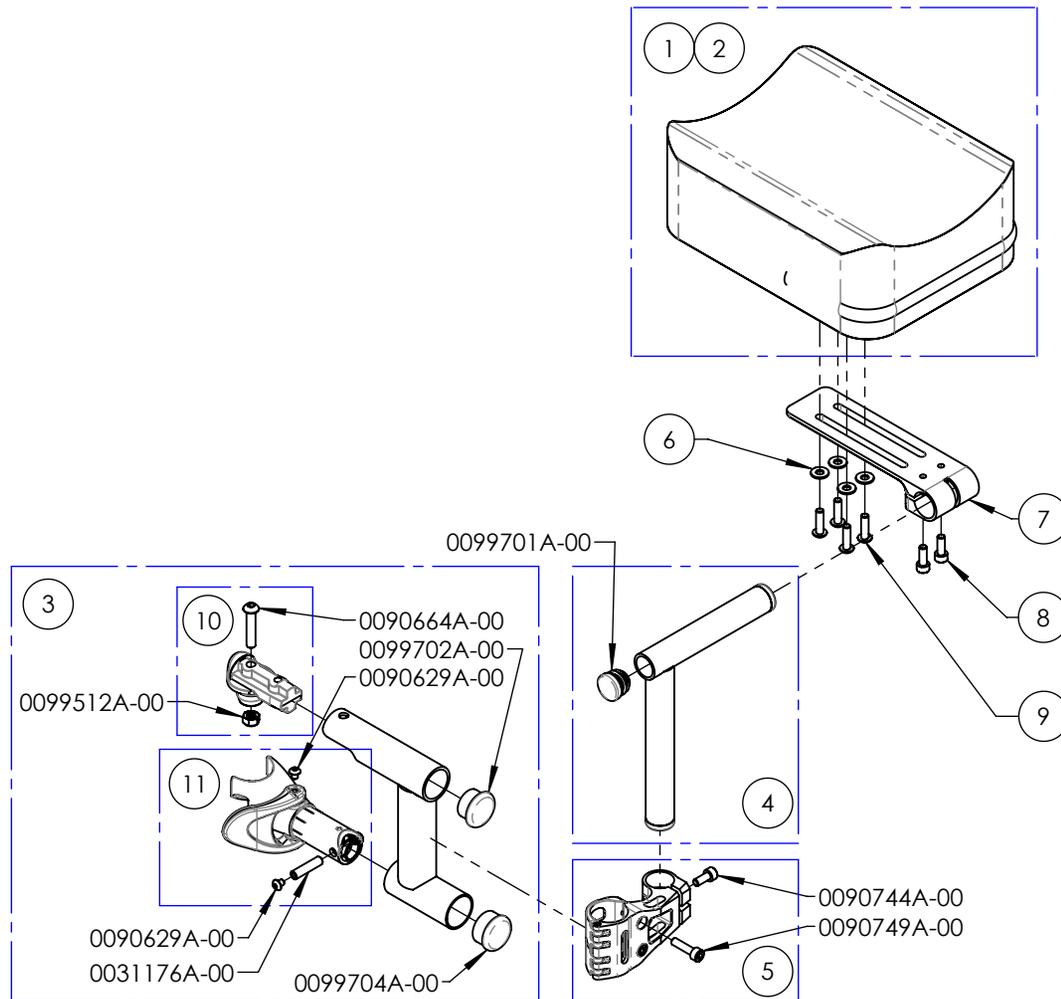

9008319B-00  
 APP-MOIGNON PROFILÉ PIVOT INT & EXT  
 DROITE 6x8po

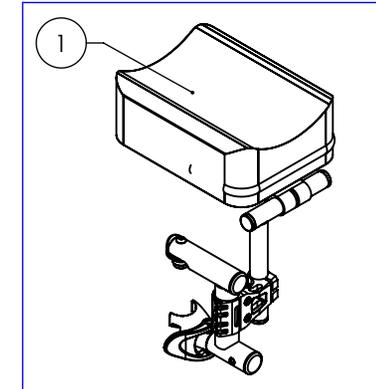


9008320B-00  
 APP-MOIGNON PROFILÉ PIVOT INT & EXT  
 DROITE 8x10po

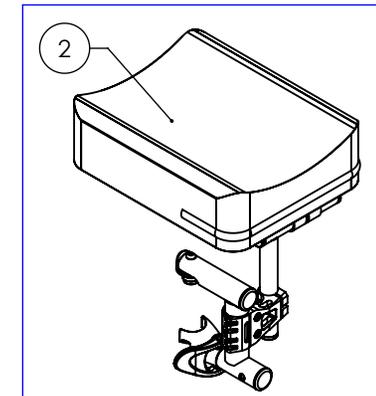


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9008321B 9008322B**  
**APP-MOIGNON PROFILÉ PIVOT INT & EXT GAUCHE**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                           | 9008321 | 9008322 | REMPLACEMENT PIÈCES |
|----------|-------------|---------------------------------------|---------|---------|---------------------|
| 1        | 0001032A-00 | COUSSIN PROFILÉ APPUI-MOIGNON 6X8po   | 1       | -       | -                   |
| 2        | 0001032A-01 | COUSSIN PROFILÉ APPUI-MOIGNON 8X10po  | -       | 1       | -                   |
| 3        | 0031580B-00 | BATI APPUI PIED UNIV V2 GAUCHE - ASSY | 1       | 1       | -                   |
| 4        | 0000899A-00 | TUBE EN T SOUDÉ - ASSY                | 1       | 1       | -                   |
| 5        | 0000870A-00 | BAGUE À DOUBLE PENTURE - ASSY         | 1       | 1       | -                   |
| 6        | 0099564A-00 | RONDELLE M5                           | 4       | 4       | -                   |
| 7        | 0000883A-00 | BAGUE SUP. APPUI-MOIGNON              | 1       | 1       | -                   |
| 8        | 0090745A-00 | VIS TÊTE CYLIND M5x0.8x14mm L         | 2       | 2       | -                   |
| 9        | 0090647A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M5x0.8x18mm L         | 4       | 4       | -                   |
| 10       | 0031551B-00 | PIVOT APPUI PIED V2 - ASSEMBLAGE      | -       | -       | 1                   |
| 11       | 0031549A-00 | BATI APPUI PIED V2 GAUCHE- ASSEMBLAGE | -       | -       | 1                   |

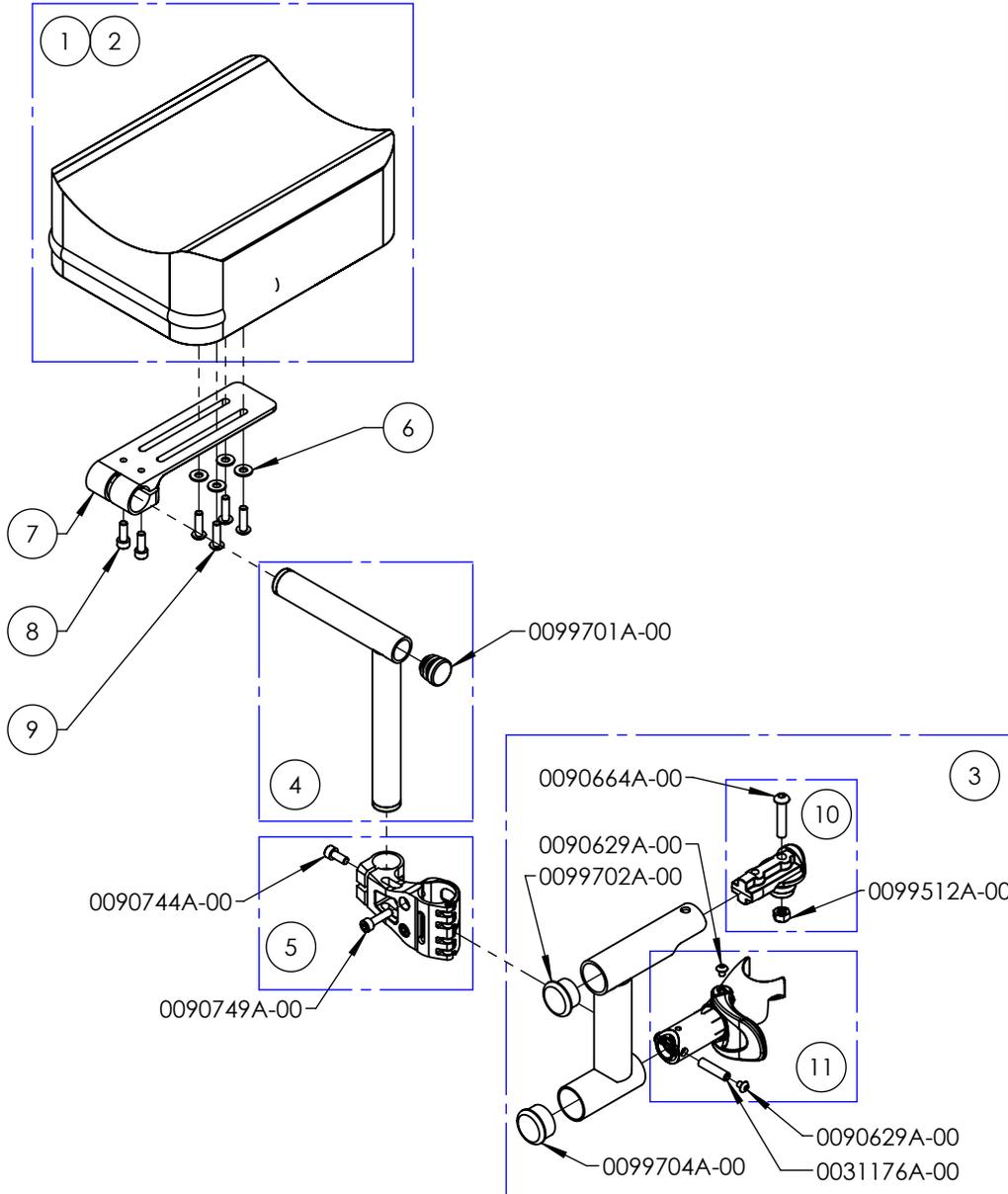

9008321B-00  
 APP-MOIGNON PROFILÉ PIVOT INT & EXT  
 GAUCHE 6x8po

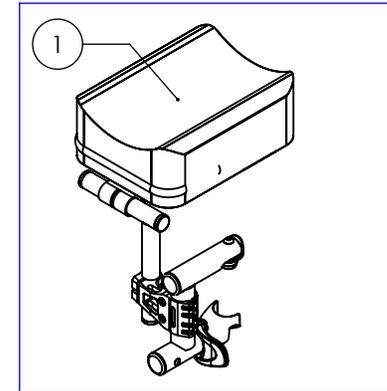


9008322B-00  
 APP-MOIGNON PROFILÉ PIVOT INT & EXT  
 GAUCHE 8x10po

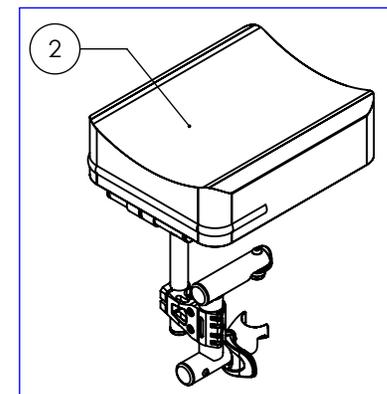

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue d'appui-pieds**  
**Supports d'appui-mollets Bodypoint Aeromesh**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                       | QTÉ |
|----------|-------------|---|-----|
| 1        | 0051409A-00 | COURROIE APPUI-MOLLET BODYPOINT AEROMESH 12-15 po | 1   |
| 2        | 0051410A-00 | COURROIE APPUI-MOLLET BODYPOINT AEROMESH 16-19 po | 1   |
| 3        | 0051411A-00 | COURROIE APPUI-MOLLET BODYPOINT AEROMESH 20-24 po | 1   |

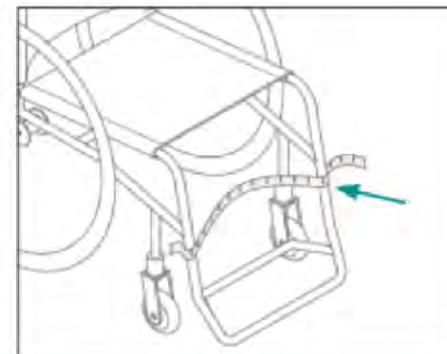


**Dimension des panneaux et courroies d'appui-mollet**

Mesurer la distance courbée autour des jambes à partir de l'extérieur du fauteuil. Choisir une dimension suffisamment large pour permettre au coussin de se courber et d'envelopper l'arrière des mollets.

**P** 35 - 40cm (14-16")

**M** 40 - 50cm (16-20")




**G** 50 - 61cm (20-24")

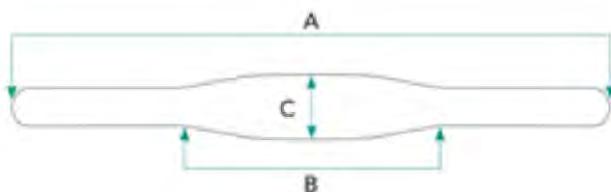


**COURROIE D'APPUI-MOLLET :**

| Dim.     | A               | B          | C             |
|----------|-----------------|------------|---------------|
| <b>P</b> | 80cm (31-1/2")  | 36cm (14") | 89mm (3-1/2") |
| <b>M</b> | 90cm (35-1/2")  | 41cm (16") | 89mm (3-1/2") |
| <b>G</b> | 100cm (39-1/2") | 46cm (18") | 89mm (3-1/2") |

**Catalogue d'appui-pieds**  
**Palettes d'appui-pied, montage frontale**

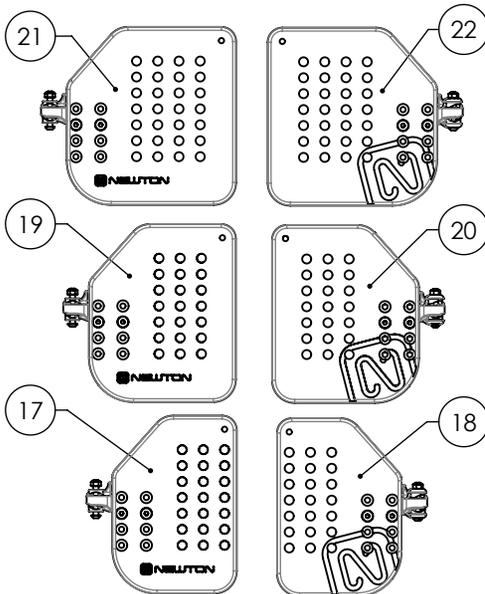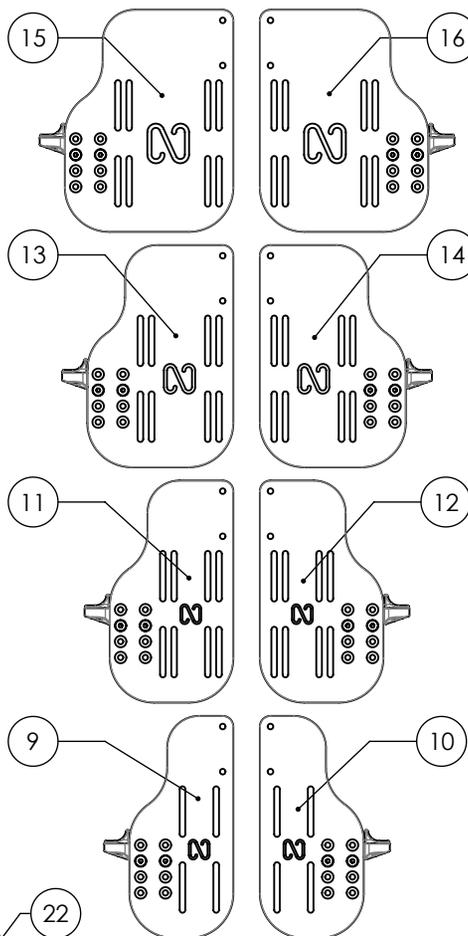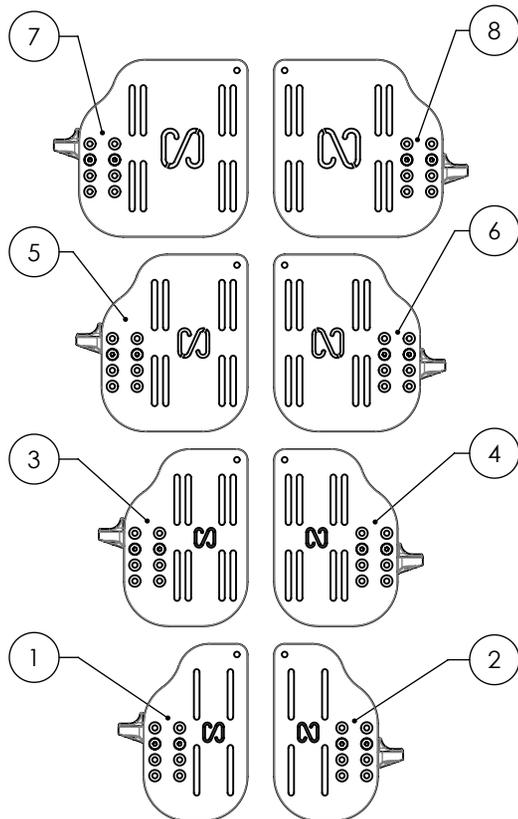

| No ITEM | No PIECE    | DESCRIPTION  | QTÉ |
|---------|-------------|--|-----|
| 1       | 9001402A-00 | MONTAGE FRONTAL - ALU, NEWTON, DROITE, 4½X8po      | 1   |
| 2       | 9001406A-00 | MONTAGE FRONTAL - ALU, NEWTON, GAUCHE, 4½X8po      | 1   |
| 3       | 9001403A-00 | MONTAGE FRONTAL - ALU, NEWTON, DROITE, 5½X8po      | 1   |
| 4       | 9001407A-00 | MONTAGE FRONTAL - ALU, NEWTON, GAUCHE, 5½X8po      | 1   |
| 5       | 9001404A-00 | MONTAGE FRONTAL - ALU, NEWTON, DROITE, 6½X8po      | 1   |
| 6       | 9001408A-00 | MONTAGE FRONTAL - ALU, NEWTON, GAUCHE, 6½X8po      | 1   |
| 7       | 9001405A-00 | MONTAGE FRONTAL - ALU, NEWTON, DROITE, 7½X8po      | 1   |
| 8       | 9001409A-00 | MONTAGE FRONTAL - ALU, NEWTON, GAUCHE, 7½X8po      | 1   |
| 9       | 9001394B-00 | MONTAGE FRONTAL - ALU, NEWTON, DROITE, 4½X10po     | 1   |
| 10      | 9001396B-00 | MONTAGE FRONTAL - ALU, NEWTON, GAUCHE, 4½X10po     | 1   |
| 11      | 9001395B-00 | MONTAGE FRONTAL - ALU, NEWTON, DROITE, 5½X10po     | 1   |
| 12      | 9001397B-00 | MONTAGE FRONTAL - ALU, NEWTON, GAUCHE, 5½X10po     | 1   |
| 13      | 9002865B-00 | MONTAGE FRONTAL - ALU, NEWTON, DROITE, 6½X10po     | 1   |
| 14      | 9002867B-00 | MONTAGE FRONTAL - ALU, NEWTON, GAUCHE, 6½X10po     | 1   |
| 15      | 9002866B-00 | MONTAGE FRONTAL - ALU, NEWTON, DROITE, 7½X10po     | 1   |
| 16      | 9002868B-00 | MONTAGE FRONTAL - ALU, NEWTON, GAUCHE, 7½X10po     | 1   |
| 17      | 9002859A-00 | MONTAGE FRONTAL - COMPOSITE, NEWTON, DROITE 5½X8po | 1   |
| 18      | 9002862A-00 | MONTAGE FRONTAL - COMPOSITE, NEWTON, GAUCHE 5½X8po | 1   |
| 19      | 9002860A-00 | MONTAGE FRONTAL - COMPOSITE, NEWTON, DROITE 6½X8po | 1   |
| 20      | 9002863A-00 | MONTAGE FRONTAL - COMPOSITE, NEWTON, GAUCHE 6½X8po | 1   |
| 21      | 9002861A-00 | MONTAGE FRONTAL - COMPOSITE, NEWTON, DROITE 7½X8po | 1   |
| 22      | 9002864A-00 | MONTAGE FRONTAL - COMPOSITE, NEWTON, GAUCHE 7½X8po | 1   |
| 23      | 9001411A-00 | COURROIE - APPUI-TALON RÉGLABLE EN LONGUEUR        | 1   |

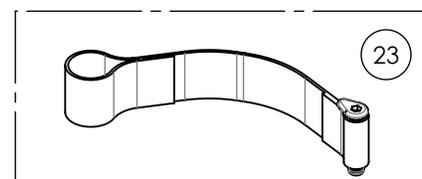


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue d'appui-pieds**  
**Courroies d'appui-mollets**

| Plage de largeur       | Longueur dépliée |
|------------------------|------------------|
| 12-14" (30.5 - 35.6cm) | 27.5" (69.9cm)   |
| 15-17" (38.1 - 43.2cm) | 34" (86.4cm)     |
| 18-22" (45.7 - 55.9cm) | 40.5" (102.9cm)  |

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                               | QTÉ |
|----------|-------------|---|-----|
| 1        | 0031159A-00 | COURROIE APPUI-MOLLETS SIMPLE 12-14 pø    | 1   |
| 2        | 0031046A-00 | COURROIE APPUI-MOLLETS SIMPLE 15-17 pø    | 1   |
| 3        | 0031047A-00 | COURROIE APPUI-MOLLETS SIMPLE 18-22 pø    | 1   |
| 4        | 0031293A-00 | COURROIE APPUI-MOLLETS DOUBLE 12-14 pø    | 1   |
| 5        | 0031281A-00 | COURROIE APPUI-MOLLETS DOUBLE 15-17 pø    | 1   |
| 6        | 0031282A-00 | COURROIE APPUI-MOLLETS DOUBLE 18-20 pø    | 1   |
| 7        | 9001414A-00 | COURROIE - APPUI-MOLLET REMBOURRÉE, MOYEN | 1   |
| 8        | 9001415A-00 | COURROIE - APPUI-MOLLET REMBOURRÉE, GRAND | 1   |


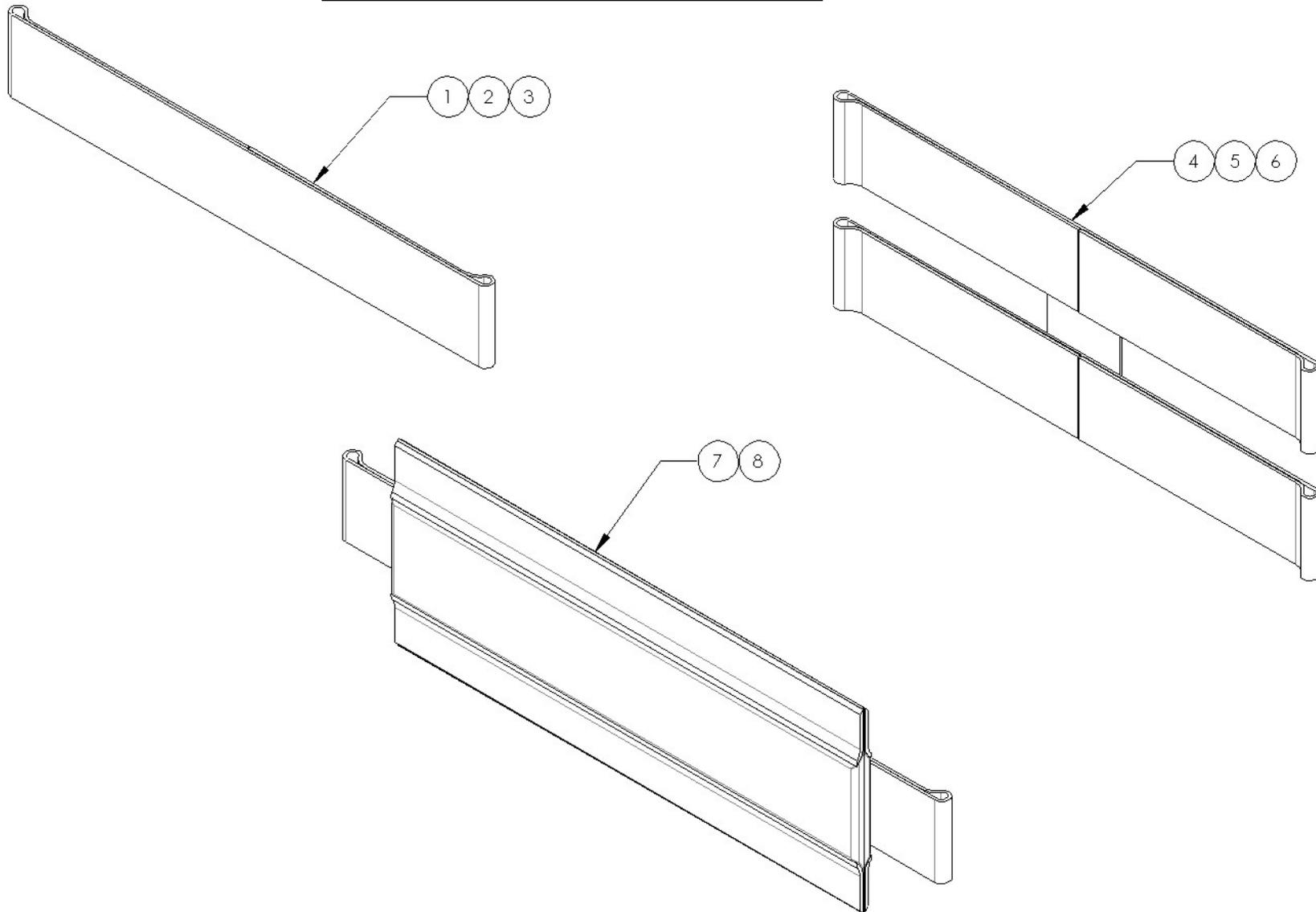


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


**Catalogue d'appui-pieds**  
**Appui-pieds montage frontal**

| No. ITEM | No. PIÈCE | DESCRIPTION  | QTÉ |
|----------|-----------|--|-----|
| 1        | 9001343   | Appui-pied - Escamotable intérieur & extérieur, montage frontal, droit, 90° - Noir               | 1   |
| 2        | 9001344   | Appui-pied - Escamotable intérieur & extérieur, montage frontal, gauche, 90° - Noir              | 1   |
| 3        | 9001345   | Appui-pied - Escamotable intérieur & extérieur, montage frontal, droit, 90° (Spécifier couleur)  | 1   |
| 4        | 9001346   | Appui-pied - Escamotable intérieur & extérieur, montage frontal, gauche, 90° (Spécifier couleur) | 1   |
| 5        | 9001347   | Appui-pied - Sans extension, montage frontal, 90° (7½ - 11 po) (19 - 28 cm)                      | 1   |
| 6        | 9001348   | Appui-pied - Extension, montage frontal, 90° (9½ - 13 po) (24 - 33 cm)                           | 1   |
| 7        | 9001349   | Appui-pied - Extension, montage frontal, 90° (9½ - 14½ po) (24 - 36,8 cm)                        | 1   |

**STRUCTURES DE MONTAGE FRONTAL**

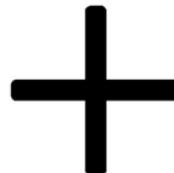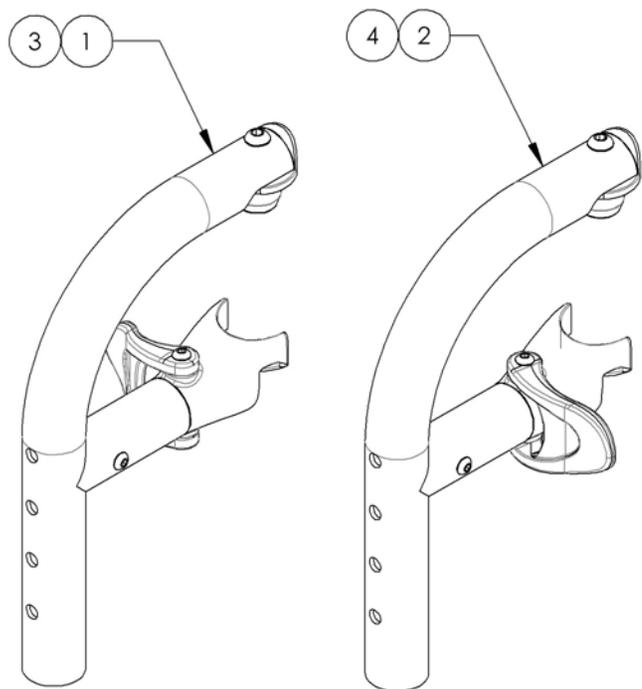

**OPTIONS D'EXTENSION POUR MONTAGE FRONTAL**

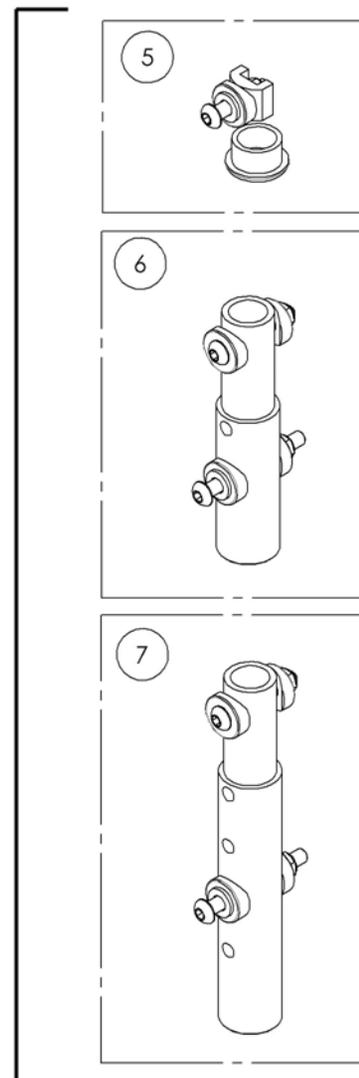


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue d'appui-pieds**  
**Appui-jambes éleveur - Escamotable intérieur & extérieur + palette composite**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                          | QTÉ |
|----------|-------------|--------------------------------------|-----|
| 1        | 9007924B-00 | AJE - V2, DROITE & PALETTE STD 6x6po | 1   |
| 2        | 9007927B-00 | AJE - V2, GAUCHE & PALETTE STD 6x6po | 1   |
| 3        | 9007925B-00 | AJE - V2, DROITE & PALETTE STD 7x6po | 1   |
| 4        | 9007928B-00 | AJE - V2, GAUCHE & PALETTE STD 7x6po | 1   |
| 5        | 9007926B-00 | AJE - V2, DROITE & PALETTE STD 8x6po | 1   |
| 6        | 9007929B-00 | AJE - V2, GAUCHE & PALETTE STD 8x6po | 1   |

| Dimension Palette | Largeur Fauteuil |
|-------------------|------------------|
| 6x6po             | 14 à 16po        |
| 7x6po             | 17 à 18po        |
| 8x6po             | 19po et +        |




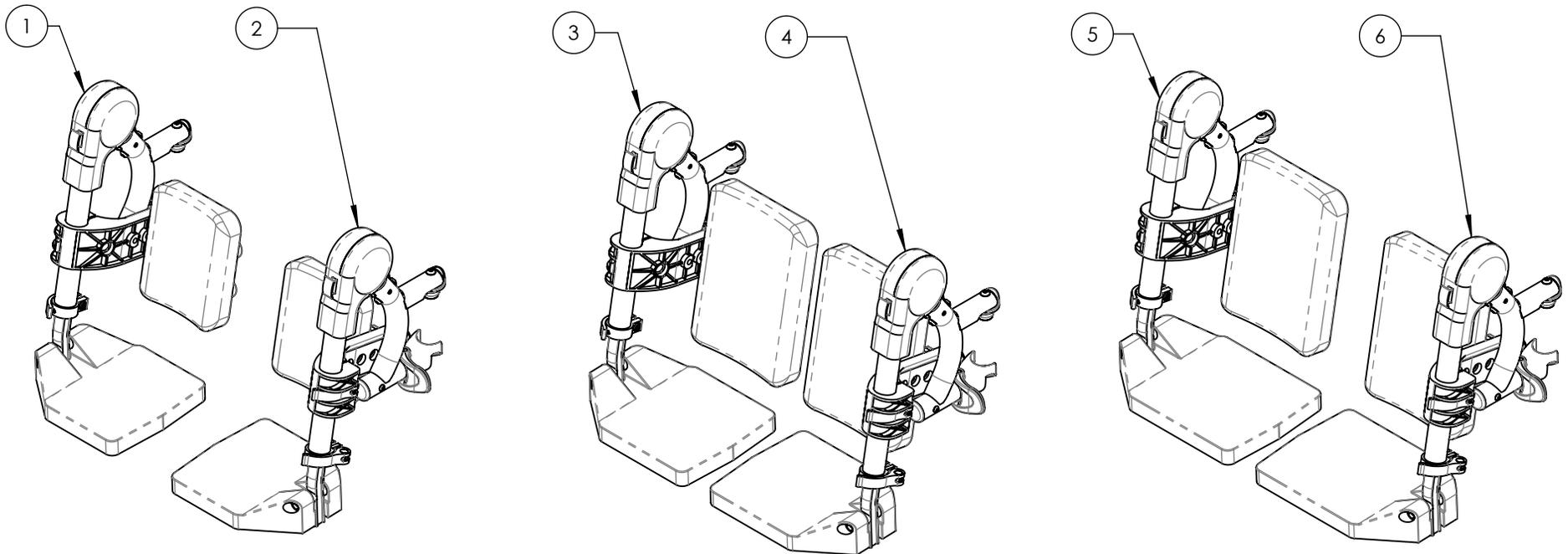


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue d'appui-pieds**  
**Appui-jambes élévateur - Escamotable intérieur & extérieur**





















| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                      | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 1        | 9001354B-00 | APPUI-JAMBE ÉLÉ - PIVOT INT & EXT, DROITE, MOYEN | 1   |
| 2        | 9001356B-00 | APPUI-JAMBE ÉLÉ - PIVOT INT & EXT, GAUCHE, MOYEN | 1   |
| 3        | 9001355B-00 | APPUI-JAMBE ÉLÉ - PIVOT INT & EXT, DROITE, GRAND | 1   |
| 4        | 9001357B-00 | APPUI-JAMBE ÉLÉ - PIVOT INT & EXT, GAUCHE, GRAND | 1   |

**ASSEMBLAGES D'APPUIS-JAMBE ÉLEVATEUR AVEC PALETTE  
COMPOSITE DISPONIBLE SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES**

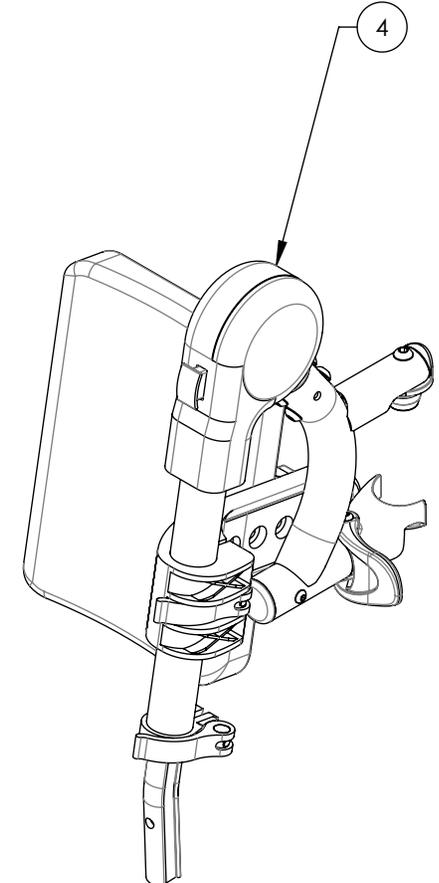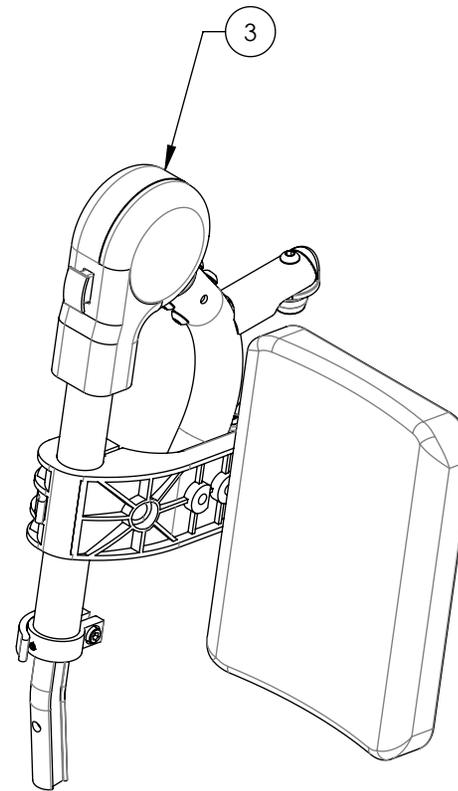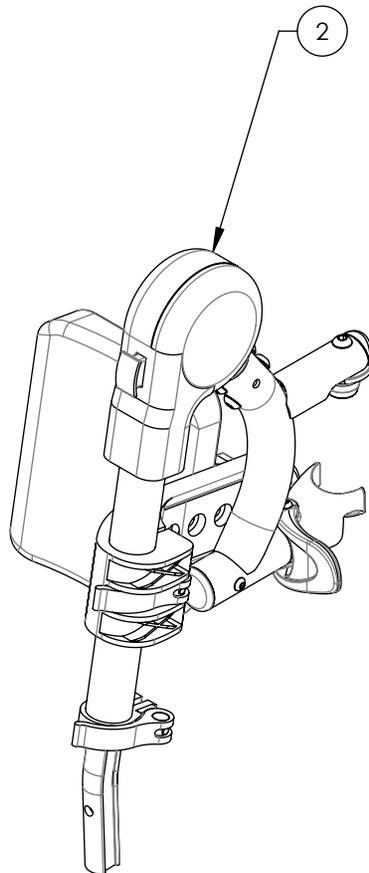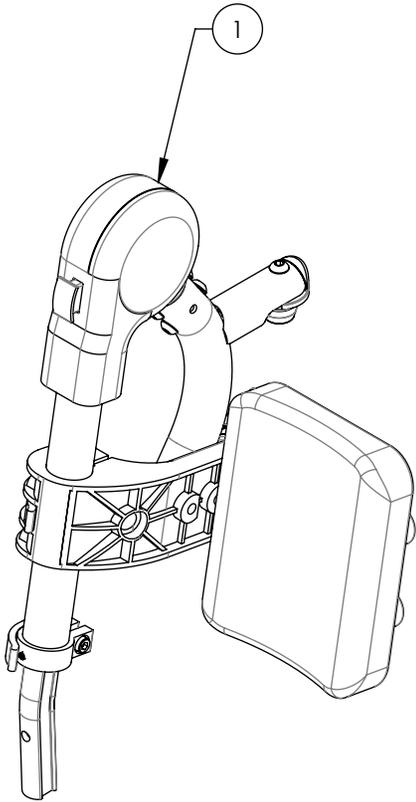


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue d'appui-pieds**  
**Palettes d'appui-pied**

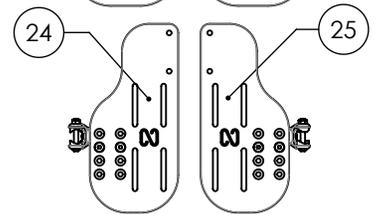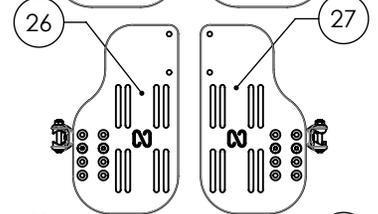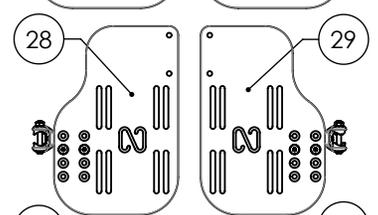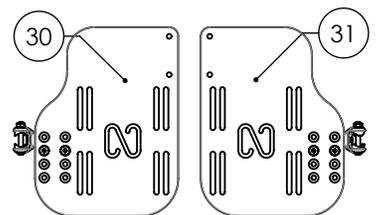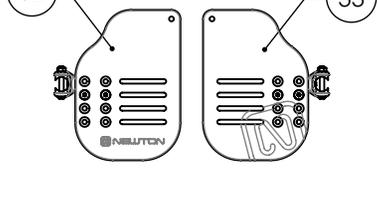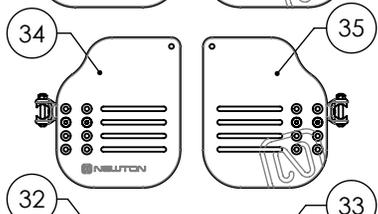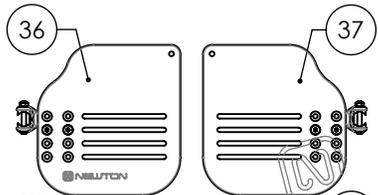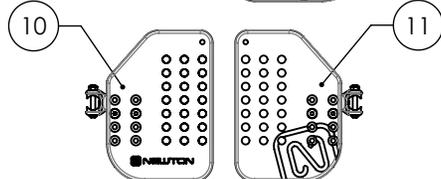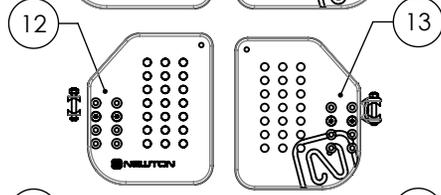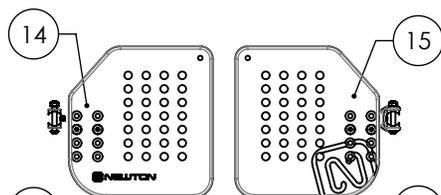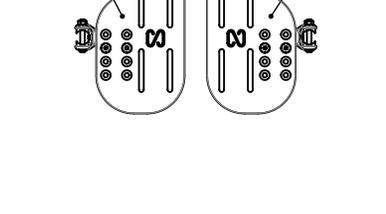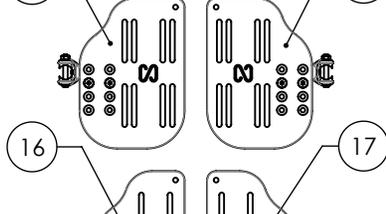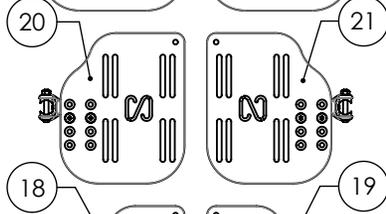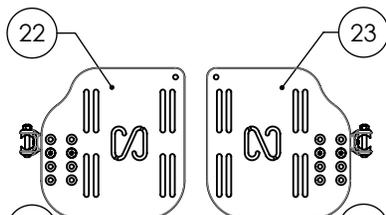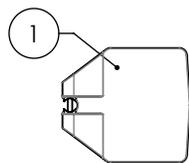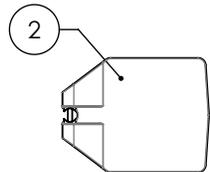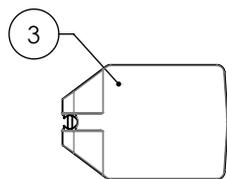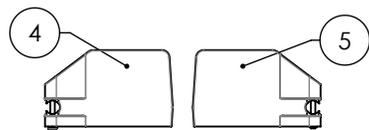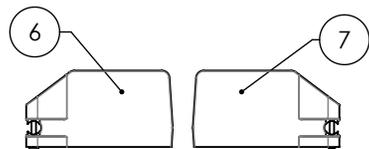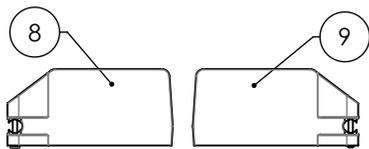

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                 | QTÉ |
|----------|-------------|---|-----|
| 1        | 9001360A-00 | Palette - Composite, 6x6po                  | 1   |
| 2        | 9001361A-00 | Palette - Composite, 7x6po                  | 1   |
| 3        | 9001362A-00 | Palette - Composite, 8x6po                  | 1   |
| 4        | 9001132A-00 | PALETTE - COMPOSITE, DROITE, 6x4po          | 1   |
| 5        | 9001135A-00 | PALETTE - COMPOSITE, GAUCHE, 6x4po          | 1   |
| 6        | 9001133A-00 | PALETTE - COMPOSITE, DROITE, 7x4po          | 1   |
| 7        | 9001136A-00 | PALETTE - COMPOSITE, GAUCHE, 7x4po          | 1   |
| 8        | 9001134A-00 | PALETTE - COMPOSITE, DROITE, 8x4po          | 1   |
| 9        | 9001137A-00 | PALETTE - COMPOSITE, GAUCHE, 8x4po          | 1   |
| 10       | 9001430A-00 | Palette - Composite, Newton, droite, 5½x8po | 1   |
| 11       | 9001433A-00 | Palette - Composite, Newton, gauche, 5½x8po | 1   |
| 12       | 9001431A-00 | Palette - Composite, Newton, droite, 6½x8po | 1   |
| 13       | 9001434A-00 | Palette - Composite, Newton, gauche, 6½x8po | 1   |
| 14       | 9001432A-00 | Palette - Composite, Newton, droite, 7½x8po | 1   |
| 15       | 9001435A-00 | Palette - Composite, Newton, gauche, 7½x8po | 1   |
| 16       | 9001363A-00 | Palette - Alu, Newton, droite, 4½x8po       | 1   |
| 17       | 9001367A-00 | Palette - Alu, Newton, gauche, 4½x8po       | 1   |
| 18       | 9001364A-00 | Palette - Alu, Newton, droite, 5½x8po       | 1   |
| 19       | 9001368A-00 | Palette - Alu, Newton, gauche, 5½x8po       | 1   |
| 20       | 9001365A-00 | Palette - Alu, Newton, droite, 6½x8po       | 1   |
| 21       | 9001369A-00 | Palette - Alu, Newton, gauche, 6½x8po       | 1   |
| 22       | 9001366A-00 | Palette - Alu, Newton, droite, 7½x8po       | 1   |
| 23       | 9001370A-00 | Palette - Alu, Newton, gauche, 7½x8po       | 1   |
| 24       | 9001398B-00 | Palette - Alu, Newton, droite, 4½x10po      | 1   |
| 25       | 9001400B-00 | PALETTE - ALU, NEWTON, GAUCHE, 4½X10po      | 1   |
| 26       | 9001399B-00 | Palette - Alu, Newton, droite, 5½x10po      | 1   |
| 27       | 9001401B-00 | PALETTE - ALU, NEWTON, GAUCHE, 5½X10po      | 1   |
| 28       | 9002869B-00 | Palette - Alu, Newton, droite, 6½x10po      | 1   |
| 29       | 9002871B-00 | PALETTE - ALU, NEWTON, GAUCHE, 6½X10po      | 1   |
| 30       | 9002870B-00 | Palette - Alu, Newton, droite, 7½x10po      | 1   |
| 31       | 9002872B-00 | PALETTE - ALU, NEWTON, GAUCHE, 7½X10po      | 1   |
| 32       | 9001384A-00 | Palette - Carbone, Newton, droite, 5½x8po   | 1   |
| 33       | 9001387A-00 | Palette - Carbone, Newton, gauche, 5½x8po   | 1   |
| 34       | 9001385A-00 | Palette - Carbone, Newton, droite, 6½x8po   | 1   |
| 35       | 9001388A-00 | Palette - Carbone, Newton, gauche, 6½x8po   | 1   |
| 36       | 9001386A-00 | Palette - Carbone, Newton, droite, 7½x8po   | 1   |
| 37       | 9001389A-00 | Palette - Carbone, Newton, gauche, 7½x8po   | 1   |
| 38       | 9001411A-00 | COUROIE - APPUI-TALON RÉGLABLE EN LONGUEUR  | 1   |

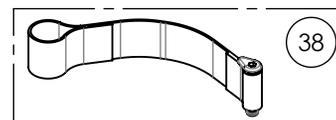

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

## Catalogue d'appui-pieds Appui-pied - Escamotable intérieur & extérieur

| No. ITEM | No. PIÈCE | DESCRIPTION   | QTÉ |
|----------|-----------|---|-----|
| 1        | 9002946   | Appui-pied - Escamotable intérieur & extérieur, droit, 60°, extension courte - Noir               | 1   |
| 2        | 9002948   | Appui-pied - Escamotable intérieur & extérieur, gauche, 60°, extension courte - Noir              | 1   |
| 3        | 9002950   | Appui-pied - Escamotable intérieur & extérieur, droit, 60°, extension courte (Spécifier couleur)  | 1   |
| 4        | 9002953   | Appui-pied - Escamotable intérieur & extérieur, gauche, 60°, extension courte (Spécifier couleur) | 1   |
| 5        | 9002947   | Appui-pied - Escamotable intérieur & extérieur, droit, 70°, extension courte - Noir               | 1   |
| 6        | 9002949   | Appui-pied - Escamotable intérieur & extérieur, gauche, 70°, extension courte - Noir              | 1   |
| 7        | 9002951   | Appui-pied - Escamotable intérieur & extérieur, droit, 70°, extension courte (Spécifier couleur)  | 1   |
| 8        | 9002954   | Appui-pied - Escamotable intérieur & extérieur, gauche, 70°, extension courte (Spécifier couleur) | 1   |
| 9        | 9003081   | Appui-pied - Escamotable intérieur & extérieur, droit, 80°, extension courte - Noir               | 1   |
| 10       | 9003082   | Appui-pied - Escamotable intérieur & extérieur, gauche, 80°, extension courte - Noir              | 1   |
| 11       | 9003083   | Appui-pied - Escamotable intérieur & extérieur, droit, 80°, extension courte (Spécifier couleur)  | 1   |
| 12       | 9003084   | Appui-pied - Escamotable intérieur & extérieur, gauche, 80°, extension courte (Spécifier couleur) | 1   |
| 13       | 9001330   | Appui-pied - Escamotable intérieur & extérieur, droit, 90°, extension courte - Noir               | 1   |
| 14       | 9001333   | Appui-pied - Escamotable intérieur & extérieur, gauche, 90°, extension courte - Noir              | 1   |
| 15       | 9001336   | Appui-pied - Escamotable intérieur & extérieur, droit, 90°, extension courte (Spécifier couleur)  | 1   |
| 16       | 9001339   | Appui-pied - Escamotable intérieur & extérieur, gauche, 90°, extension courte (Spécifier couleur) | 1   |

| No. ITEM | No. PIÈCE | DESCRIPTION   | QTÉ |
|----------|-----------|---|-----|
| 5        | 9001328   | Appui-pied - Escamotable intérieur & extérieur, droit, 60°, extension longue - Noir               | 1   |
| 6        | 9001331   | Appui-pied - Escamotable intérieur & extérieur, gauche, 60°, extension longue - Noir              | 1   |
| 7        | 9001334   | Appui-pied - Escamotable intérieur & extérieur, droit, 60°, extension longue (Spécifier couleur)  | 1   |
| 8        | 9001337   | Appui-pied - Escamotable intérieur & extérieur, gauche, 60°, extension longue (Spécifier couleur) | 1   |
| 13       | 9001329   | Appui-pied - Escamotable intérieur & extérieur, droit, 70°, extension longue - Noir               | 1   |
| 14       | 9001332   | Appui-pied - Escamotable intérieur & extérieur, gauche, 70°, extension longue - Noir              | 1   |
| 15       | 9001335   | Appui-pied - Escamotable intérieur & extérieur, droit, 70°, extension longue (Spécifier couleur)  | 1   |
| 16       | 9001338   | Appui-pied - Escamotable intérieur & extérieur, gauche, 70°, extension longue (Spécifier couleur) | 1   |
| 21       | 9003085   | Appui-pied - Escamotable intérieur & extérieur, droit, 80°, extension longue - Noir               | 1   |
| 22       | 9003086   | Appui-pied - Escamotable intérieur & extérieur, gauche, 80°, extension longue - Noir              | 1   |
| 23       | 9003087   | Appui-pied - Escamotable intérieur & extérieur, droit, 80°, extension longue (Spécifier couleur)  | 1   |
| 24       | 9003088   | Appui-pied - Escamotable intérieur & extérieur, gauche, 80°, extension longue (Spécifier couleur) | 1   |
| 29       | 9002916   | Appui-pied - Escamotable intérieur & extérieur, droit, 90°, extension longue - Noir               | 1   |
| 30       | 9002917   | Appui-pied - Escamotable intérieur & extérieur, gauche, 90°, extension longue - Noir              | 1   |
| 31       | 9002955   | Appui-pied - Escamotable intérieur & extérieur, droit, 90°, extension longue (Spécifier couleur)  | 1   |
| 32       | 9002952   | Appui-pied - Escamotable intérieur & extérieur, gauche, 90°, extension longue (Spécifier couleur) | 1   |

### PLAGE EXTENSION COURTE 60° & 70°

- 13.5 - 17" (Coupé 2 segments)
- 14.5 - 18" (Coupé 1 segment)
- 15.5 - 19" (Pas de coupe)\*

### PLAGE EXTENSION COURTE 80°

- 13.5 - 16" (Coupé 2 segments)
- 14.5 - 17" (Coupé 1 segment)
- 15.5 - 18" (Pas de coupe)\*


### PLAGE EXTENSION LONGUE 60°, 70° & 80°

- 14.5 - 19.5" (Coupé 1 segment)
- 15.5 - 20.5" (Pas de coupe)\*

### PLAGE EXTENSION COURTE 90°

- 11.5 - 14" (Pas de coupe)
- ### PLAGE EXTENSION LONGUE 90°
- 14 - 17" (Pas de coupe)



\*Les pièces ne seront pas coupées, si ce n'est pas exigé

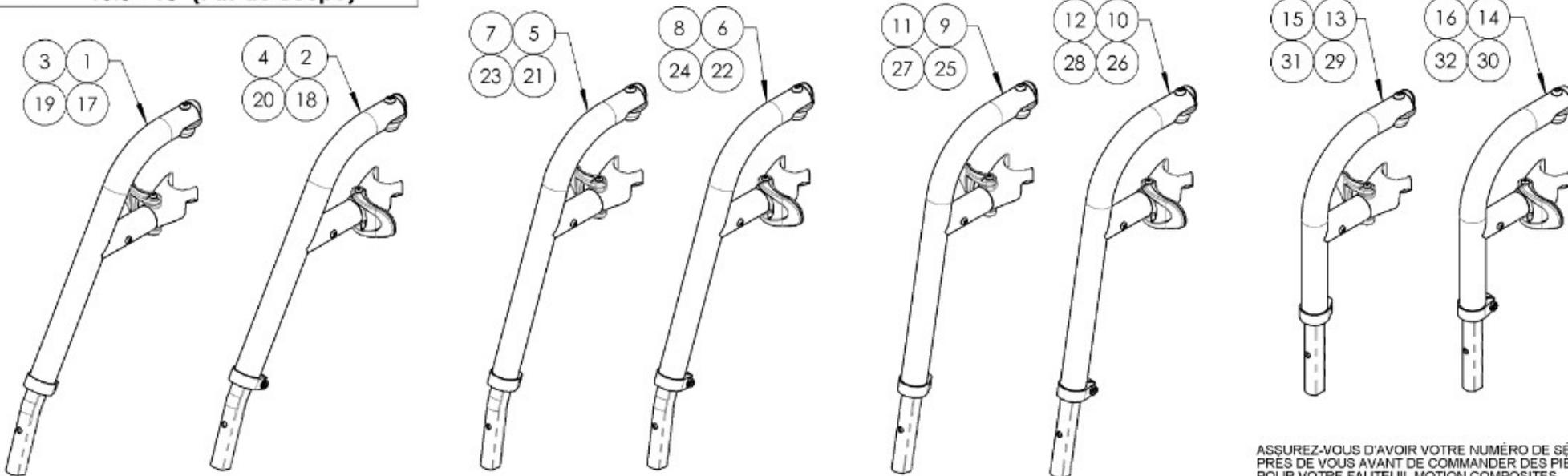

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue d'appui-pieds**  
**Pastille d'appui-pieds 20°**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                       | QTÉ |
|----------|-------------|-----------------------------------|-----|
| 1        | 9001644A-00 | Pastille appui-pied - droite, 20° | 1   |
| 2        | 9001645A-00 | Pastille appui-pied - gauche, 20° | 1   |

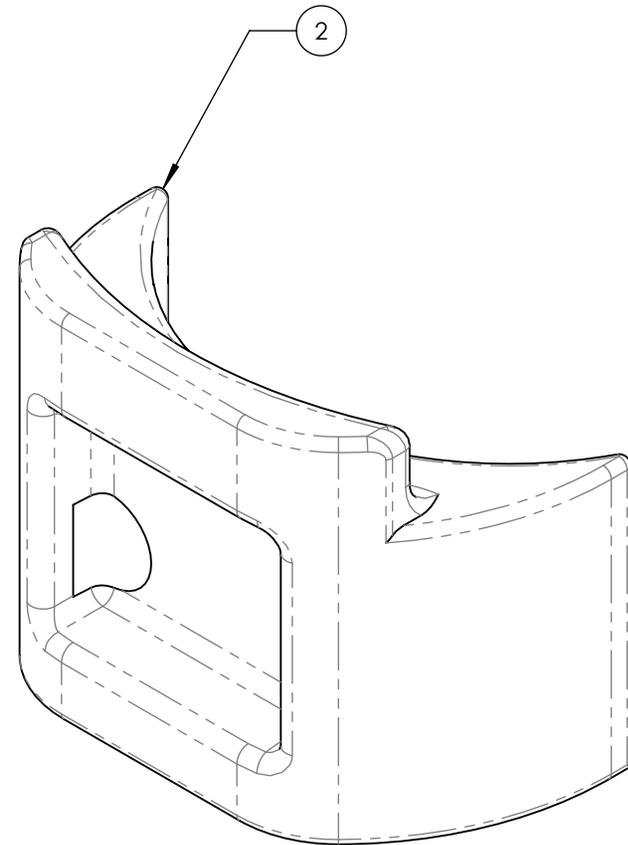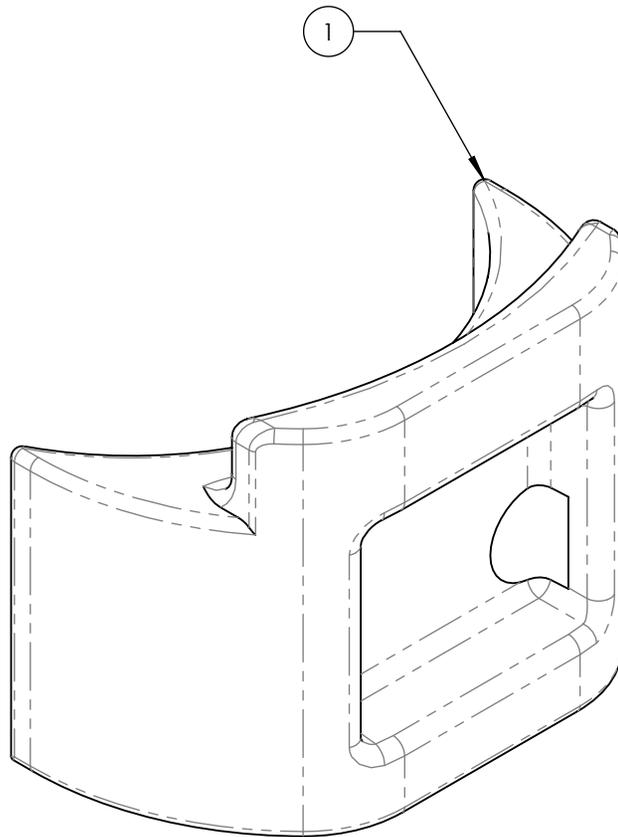


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue d'appui-pieds**  
**Montage haut, extension avec bagues**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                          | QTÉ |
|----------|-------------|--------------------------------------|-----|
| 1        | 9001318A-00 | MONTAGE HAUT - EXTENSION AVEC BAGUES | 1   |

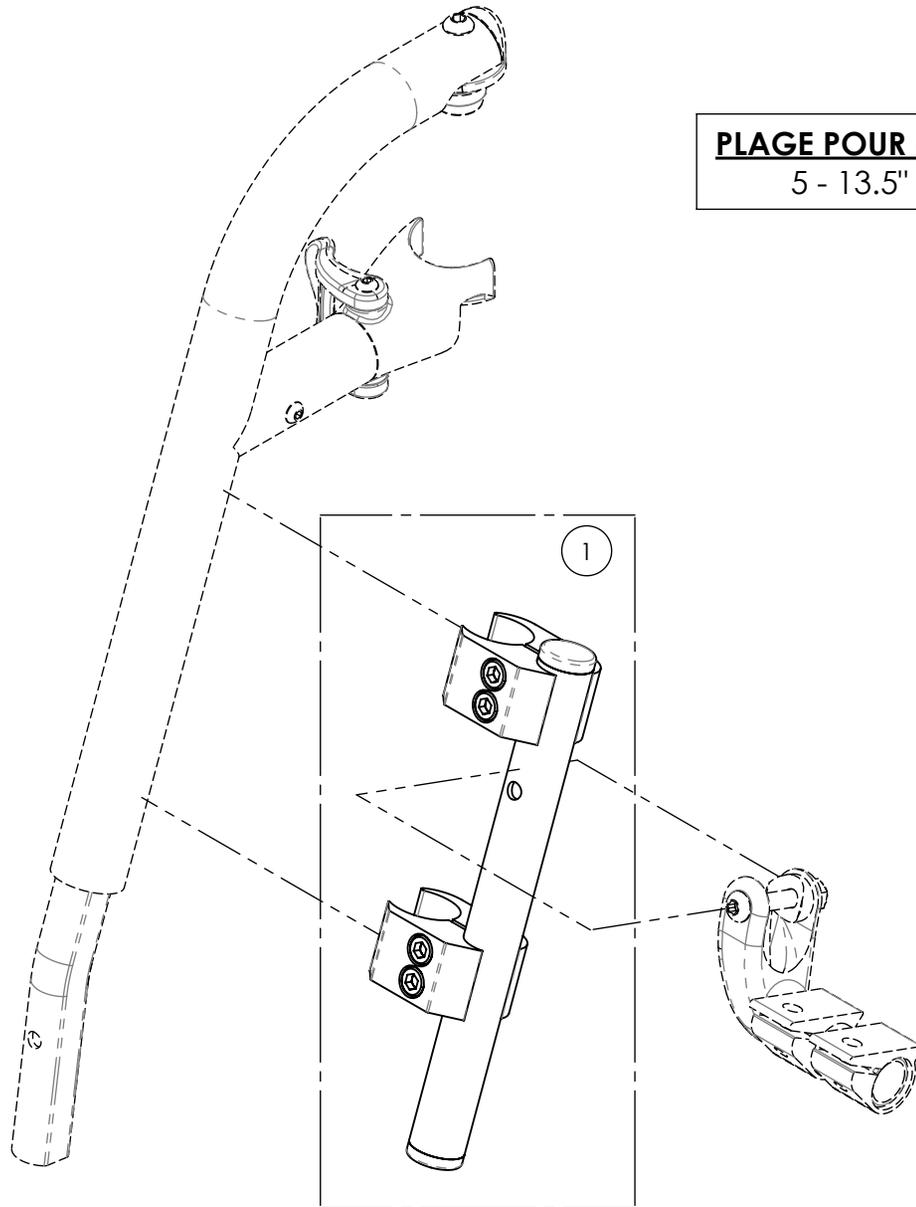


**PLAGE POUR MONTAGE HAUT**  
5 - 13.5" (127 - 343mm)

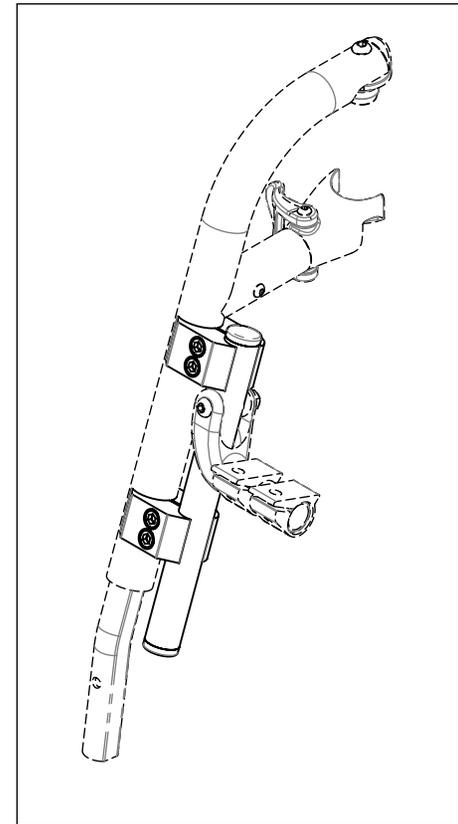

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue d'appui-pieds**  
**Structure pour palette pleine largeur rabattable**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                      | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 1        | 9001380A-00 | EXTENSION - PALETTE PLEINE LARGEUR RABATTABLE    | 1   |
| 2        | 9007669A-00 | TUBE DE BASE - PALETTE PLEINE LARGEUR RABATTABLE | 1   |

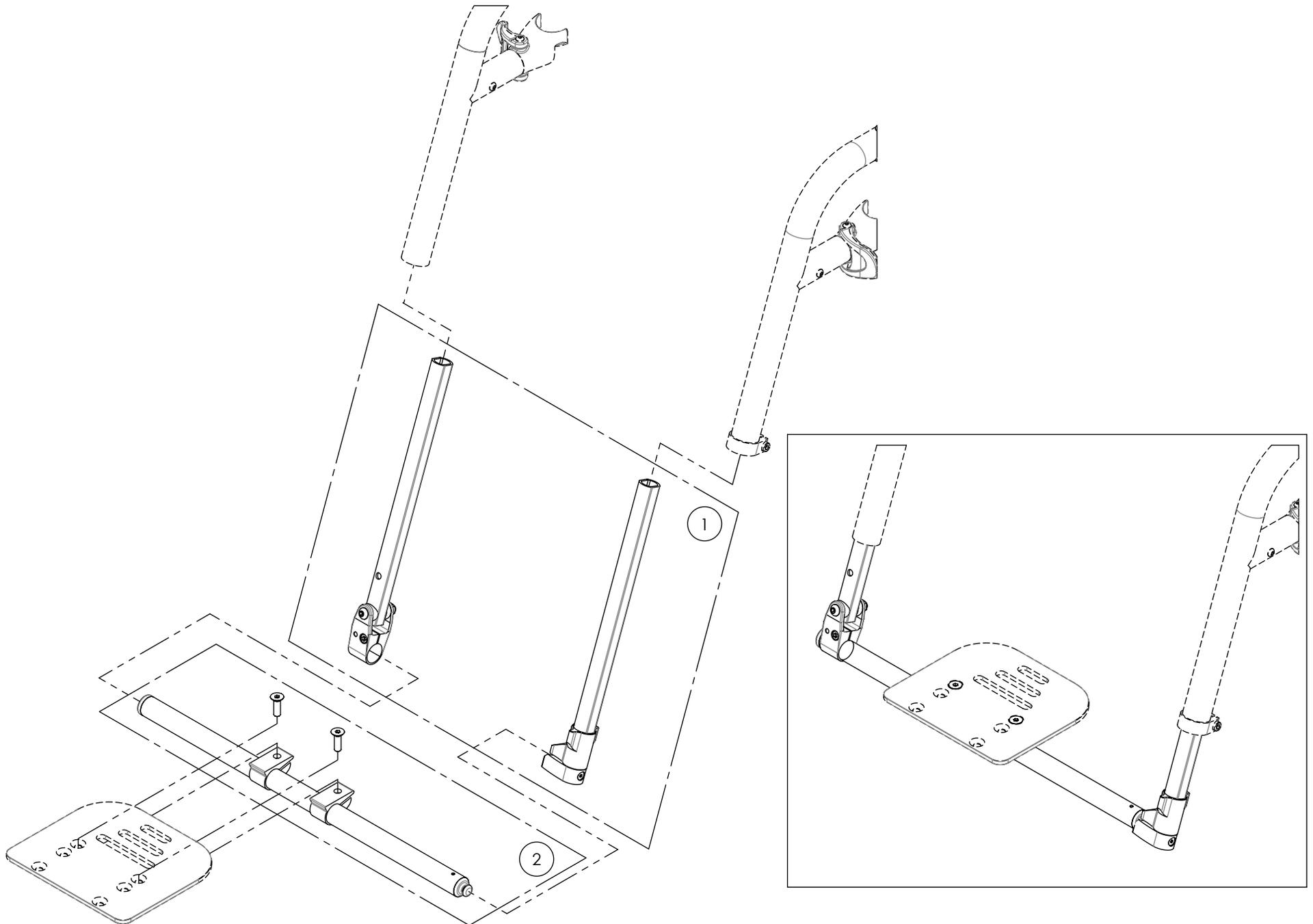


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue d'appui-pieds**  
**Palettes pleine largeur**


| Dimension Palette | Largeur Fauteuil |
|-------------------|------------------|
| 4x5.5po           | 12 to 13po       |
| 6x5.5po           | 14 to 16po       |
| 8x5.5po           | 17 to 18po       |
| 10x5.5po          | 19 to 20po       |
| 12x5.5po          | 21 to 22po       |

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                        | QTÉ |
|----------|-------------|------------------------------------|-----|
| 1        | 0031127A-00 | PALETTE CARBONE PLATEFORME 6p ◊    | 1   |
| 2        | 0031128A-00 | PALETTE CARBONE PLATEFORME 8p ◊    | 1   |
| 3        | 0031129A-00 | PALETTE CARBONE PLATEFORME 10p ◊   | 1   |
| 4        | 0031130A-00 | PALETTE CARBONE PLATEFORME 12p ◊   | 1   |
| 5        | 0031088A-00 | PALETTE ALUMINIUM PLATEFORME 4p ◊  | 1   |
| 6        | 0031089A-00 | PALETTE ALUMINIUM PLATEFORME 6p ◊  | 1   |
| 7        | 0031090A-00 | PALETTE ALUMINIUM PLATEFORME 8p ◊  | 1   |
| 8        | 0031091A-00 | PALETTE ALUMINIUM PLATEFORME 10p ◊ | 1   |
| 9        | 0031092A-00 | PALETTE ALUMINIUM PLATEFORME 12p ◊ | 1   |

**PALETTES PLEINE LARGEUR CARBONE**

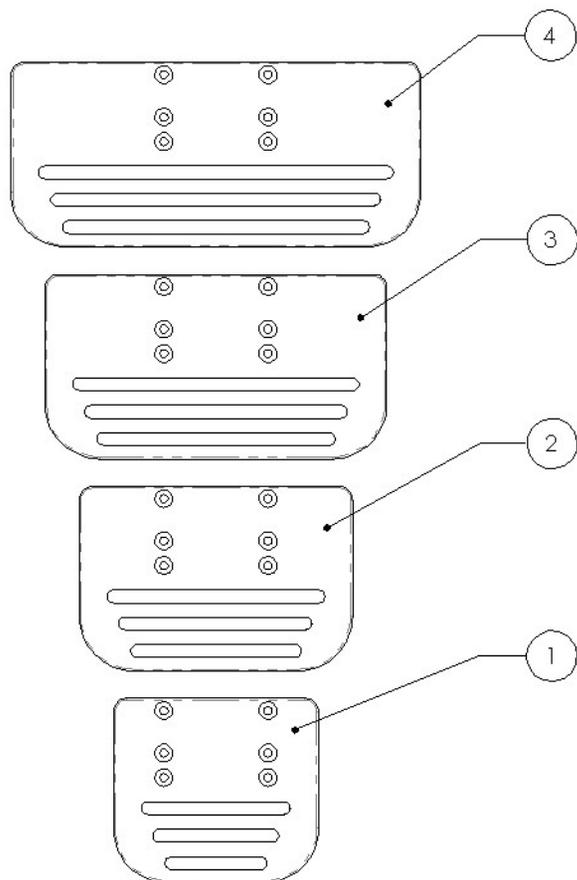



**PALETTES PLEINE LARGEUR ALUMINIUM**

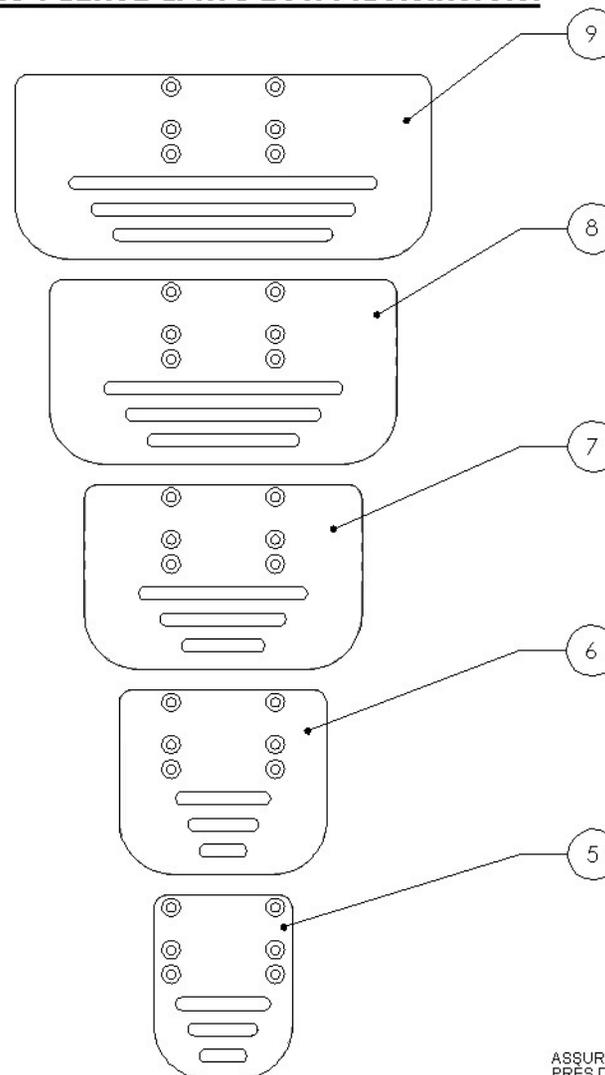

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES



**Catalogue d'appui-pieds**  
**Pare-chocs avant à roulette**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                    | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 1        | 9001752A-00 | PARE-CHOCS - À ROULETTE, PALETTE COMP.         | 1   |
| 2        | 9001753A-00 | PARE-CHOCS - À ROULETTE, PALETTE ALU & CARBONE | 1   |

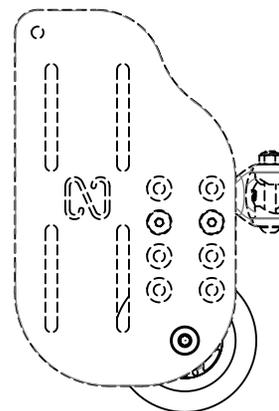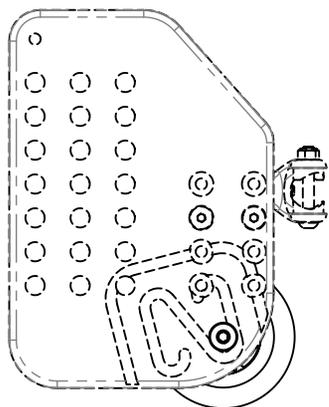





**POUR PALETTES RÉGLABLES  
 EN ANGLE NEWTON COMPOSITE**

**POUR PALETTES RÉGLABLES EN ANGLE  
 NEWTON ALUMINIUM & CARBONE**

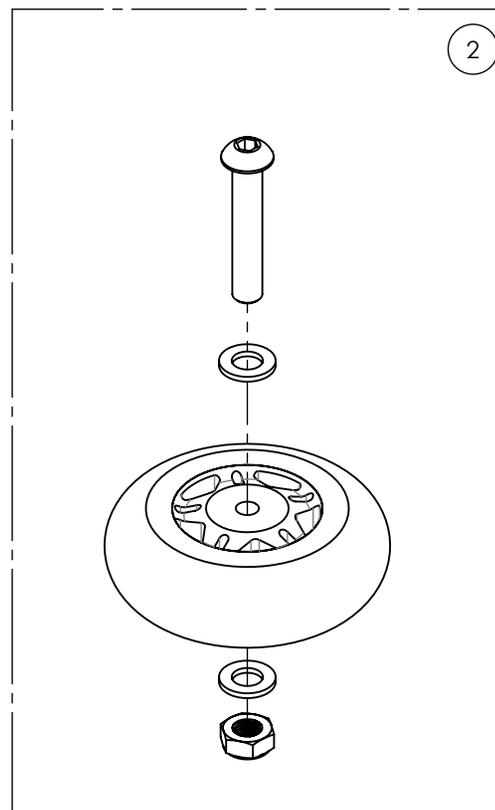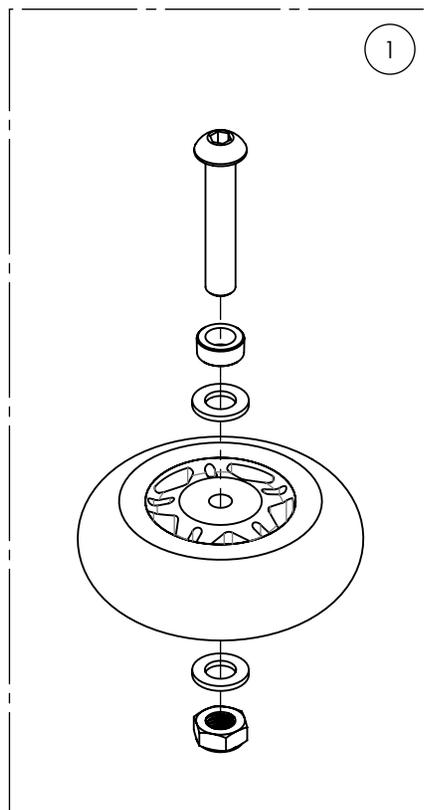

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue d'appuie-pieds**  
**Appuie-moignon V2 - Pivot interne & externe**

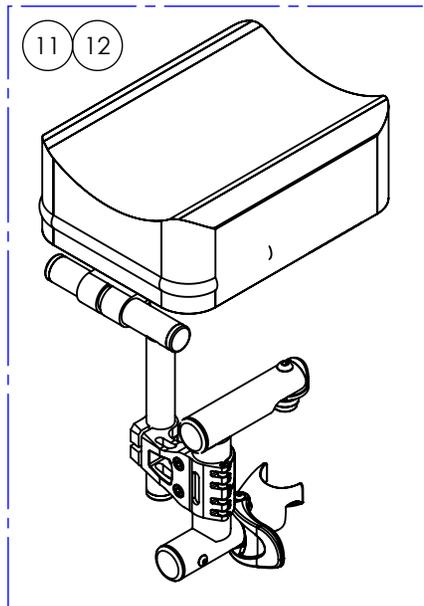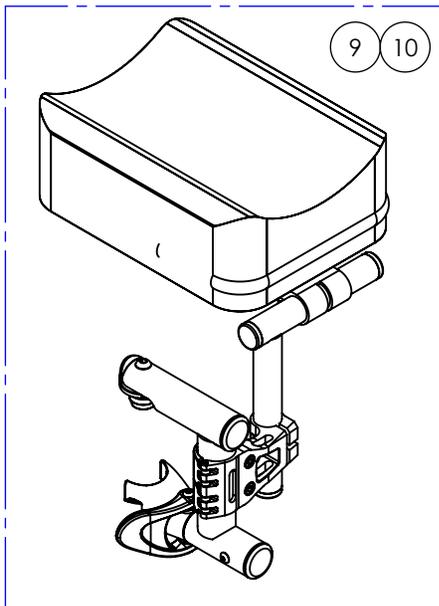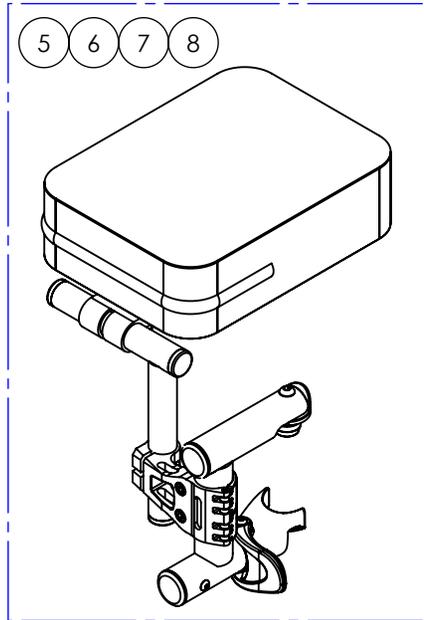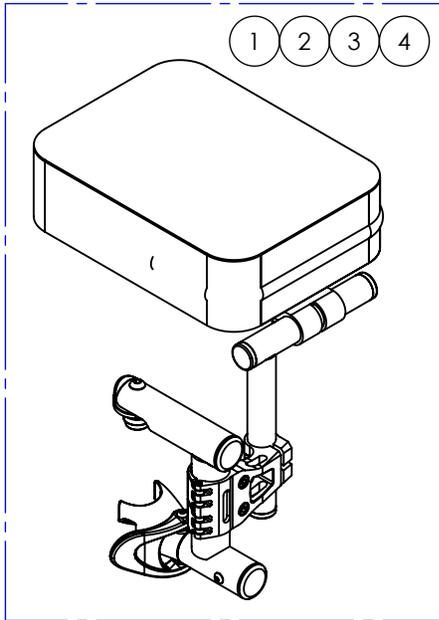


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                       | QTÉ |
|----------|-------------|---|-----|
| 1        | 9008305B-00 | APP-MOIGNON PLAT PIVOT INT & EXT DROITE 6x8po     | 1   |
| 2        | 9008306B-00 | APP-MOIGNON PLAT PIVOT INT & EXT DROITE 8x10po    | 1   |
| 3        | 9008307B-00 | APP-MOIGNON PLAT PIVOT INT & EXT DROITE 10x10po   | 1   |
| 4        | 9008308B-00 | APP-MOIGNON PLAT PIVOT INT & EXT DROITE 10x14po   | 1   |
| 5        | 9008310B-00 | APP-MOIGNON PLAT PIVOT INT & EXT GAUCHE 6x8po     | 1   |
| 6        | 9008311B-00 | APP-MOIGNON PLAT PIVOT INT & EXT GAUCHE 8x10po    | 1   |
| 7        | 9008312B-00 | APP-MOIGNON PLAT PIVOT INT & EXT GAUCHE 10x10po   | 1   |
| 8        | 9008313B-00 | APP-MOIGNON PLAT PIVOT INT & EXT GAUCHE 10x14po   | 1   |
| 9        | 9008319B-00 | APP-MOIGNON PROFILÉ PIVOT INT & EXT DROITE 6x8po  | 1   |
| 10       | 9008320B-00 | APP-MOIGNON PROFILÉ PIVOT INT & EXT DROITE 8x10po | 1   |
| 11       | 9008321B-00 | APP-MOIGNON PROFILÉ PIVOT INT & EXT GAUCHE 6x8po  | 1   |
| 12       | 9008322B-00 | APP-MOIGNON PROFILÉ PIVOT INT & EXT GAUCHE 8x10po | 1   |

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**0007415A-00**  
**MONTANT- ALU, IPH, DROIT 21-24po**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                          | QTÉ |
|----------|-------------|--------------------------------------|-----|
| 1        | 0005596A-00 | DOSSIER ALU DROIT IPH 21-24po - ASSY | 1   |
| 2        | 0090647A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M5x0.8x18mm L        | 1   |

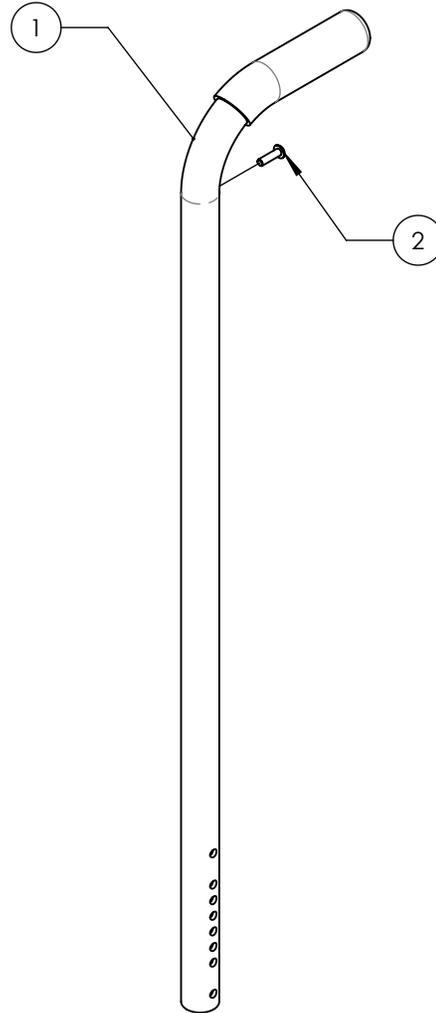

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES



**0007417A-00**  
**MONTANT- ALU, IPH, 8°, 21-24po**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                          | QTÉ |
|----------|-------------|--------------------------------------|-----|
| 1        | 0005758A-00 | DOSSIER ALU 8 DEG IPH 21-24po - ASSY | 1   |
| 2        | 0090647A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M5x0.8x18mm L        | 1   |

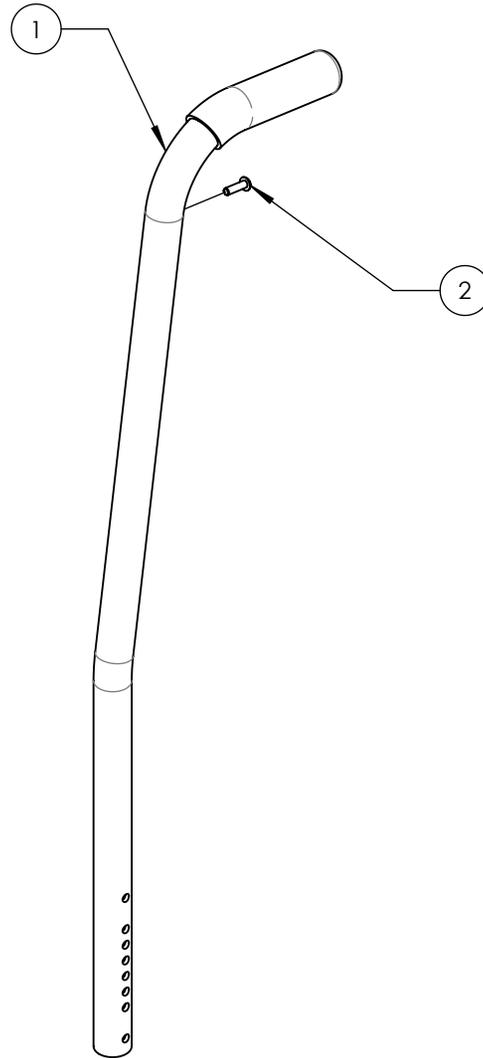


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**0022004C-00**  
**Ancrage - Arrière, std**

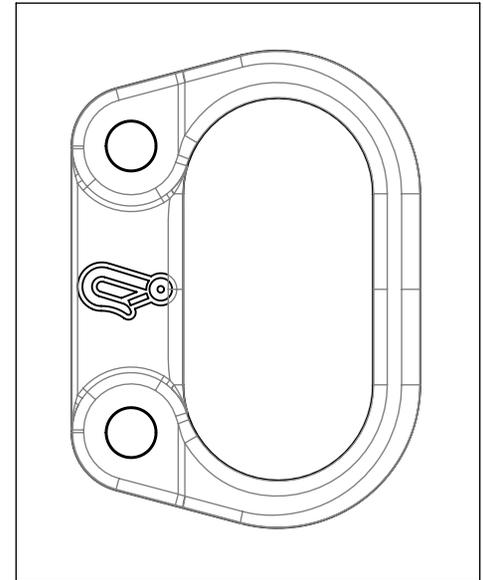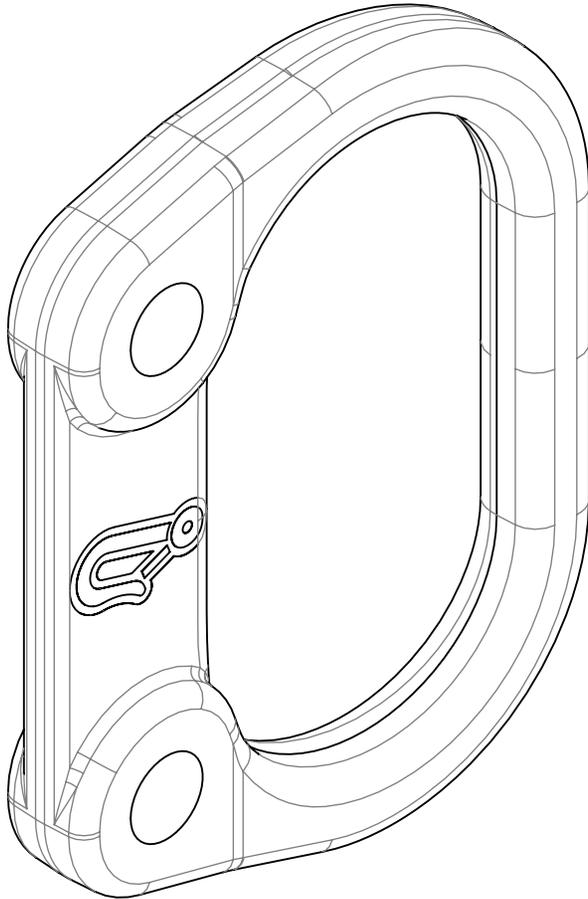


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**0051523A\_0051533A**  
**Poignée poussette**

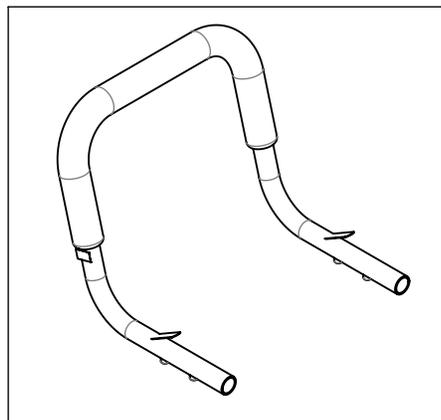

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                      | 0051523 / QTE. | 0051524 / QTE. | 0051525 / QTE. | 0051526 / QTE. | 0051527 / QTE. | 0051528 / QTE. | 0051529 / QTE. | 0051530 / QTE. | 0051531 / QTE. | 0051532 / QTE. | 0051533 / QTE. |
|----------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1        | 0051226A-00 | BOUTON POUSSOIR DOUBLE POUR POIGNÉE DE POUSSETTE | 2              | 2              | 2              | 2              | 2              | 2              | 2              | 2              | 2              | 2              | 2              |
| 2        | 0070780A-00 | ÉTIQUETTE ADHÉSIVE BLANCHE VOID 1.33X%po         | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              |
| 3        | 0051077A-00 | STRUCTURE POIGNÉE POUSSETTE 10po                 | 1              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| 4        | 0051594A-00 | GARNITURE POIGNÉE POUSSETTE 10po                 | 1              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| 5        | 0051078A-00 | STRUCTURE POIGNÉE POUSSETTE 11po                 | -              | 1              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| 6        | 0051595A-00 | GARNITURE POIGNÉE POUSSETTE 11po                 | -              | 1              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| 7        | 0051079A-00 | STRUCTURE POIGNÉE POUSSETTE 12po                 | -              | -              | 1              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| 8        | 0051596A-00 | GARNITURE POIGNÉE POUSSETTE 12po                 | -              | -              | 1              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| 9        | 0051080A-00 | STRUCTURE POIGNÉE POUSSETTE 13po                 | -              | -              | -              | 1              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| 10       | 0051597A-00 | GARNITURE POIGNÉE POUSSETTE 13po                 | -              | -              | -              | 1              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| 11       | 0051081A-00 | STRUCTURE POIGNÉE POUSSETTE 14po                 | -              | -              | -              | -              | 1              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| 12       | 0051598A-00 | GARNITURE POIGNÉE POUSSETTE 14po                 | -              | -              | -              | -              | 1              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| 13       | 0051082A-00 | STRUCTURE POIGNÉE POUSSETTE 15po                 | -              | -              | -              | -              | -              | 1              | -              | -              | -              | -              | -              |
| 14       | 0051599A-00 | GARNITURE POIGNÉE POUSSETTE 15po                 | -              | -              | -              | -              | -              | 1              | -              | -              | -              | -              | -              |
| 15       | 0051083A-00 | STRUCTURE POIGNÉE POUSSETTE 16po                 | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 1              | -              | -              | -              | -              |
| 16       | 0051600A-00 | GARNITURE POIGNÉE POUSSETTE 16po                 | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 1              | -              | -              | -              | -              |
| 17       | 0051084A-00 | STRUCTURE POIGNÉE POUSSETTE 17po                 | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 1              | -              | -              | -              |
| 18       | 0051601A-00 | GARNITURE POIGNÉE POUSSETTE 17po                 | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 1              | -              | -              | -              |
| 19       | 0051085A-00 | STRUCTURE POIGNÉE POUSSETTE 18po                 | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 1              | -              | -              |
| 20       | 0051602A-00 | GARNITURE POIGNÉE POUSSETTE 18po                 | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 1              | -              | -              |
| 21       | 0051086A-00 | STRUCTURE POIGNÉE POUSSETTE 19po                 | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 1              | -              |
| 22       | 0051603A-00 | GARNITURE POIGNÉE POUSSETTE 19po                 | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 1              | -              |
| 23       | 0051087A-00 | STRUCTURE POIGNÉE POUSSETTE 20po                 | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 1              |
| 24       | 0051604A-00 | GARNITURE POIGNÉE POUSSETTE 20po                 | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 1              |

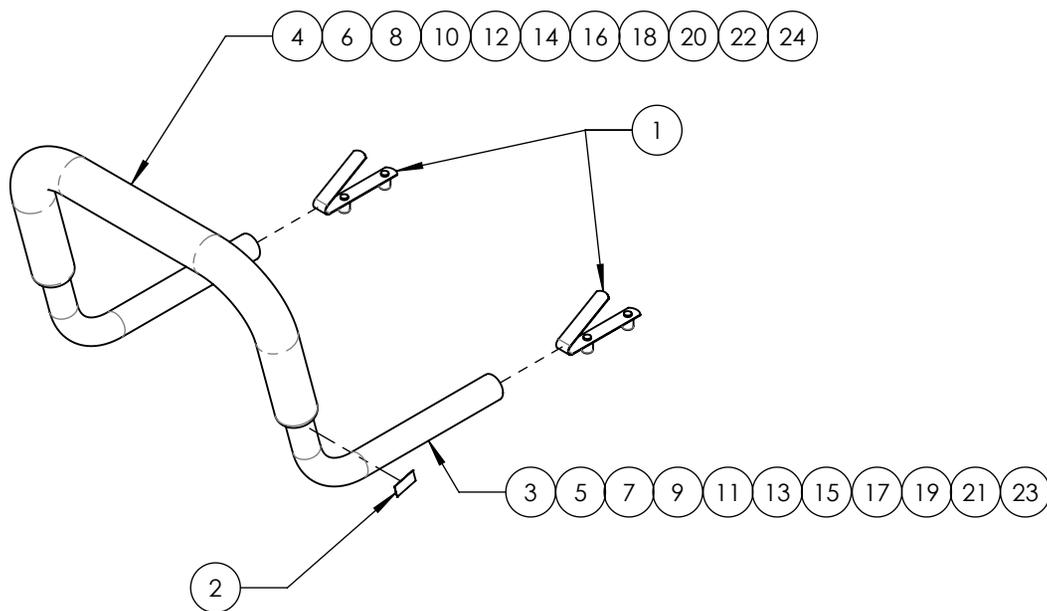

**AVERTISSEMENT important sur les poignées de poussette**





Les poignées de poussette n'ont pas été conçues pour soulever ou tirer le poids d'un utilisateur dans son fauteuil roulant. Cet accessoire est conçu pour pousser et guider l'utilisateur dans son fauteuil.

Soulever ou tirer le poids d'un utilisateur dans son fauteuil roulant peut résulter à un bris des poignées de poussée et causer des blessures graves  
**(SVP VOUS RÉFÉRER AU MANUEL D'UTILISATEUR)**

**0060704C\_0060714C**  
**Barre de tension de dossier Newton**


| No. ITEM | DESCRIPTION                                 | 60704/<br>QTÉ | 60705/<br>QTÉ | 60706/<br>QTÉ | 60707/<br>QTÉ | 60708/<br>QTÉ | 60709/<br>QTÉ | 60710/<br>QTÉ | 60711/<br>QTÉ | 60712/<br>QTÉ | 60713/<br>QTÉ | 60714/<br>QTÉ |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1        | BARRE DE TENSION PLIABLE NEWTON 12po - ASSY | 1             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| 2        | BARRE DE TENSION PLIABLE NEWTON 13po - ASSY | -             | 1             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| 3        | BARRE DE TENSION PLIABLE NEWTON 14po - ASSY | -             | -             | 1             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| 4        | BARRE DE TENSION PLIABLE NEWTON 15po - ASSY | -             | -             | -             | 1             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| 5        | BARRE DE TENSION PLIABLE NEWTON 16po - ASSY | -             | -             | -             | -             | 1             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| 6        | BARRE DE TENSION PLIABLE NEWTON 17po - ASSY | -             | -             | -             | -             | -             | 1             | -             | -             | -             | -             | -             |
| 7        | BARRE DE TENSION PLIABLE NEWTON 18po - ASSY | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 1             | -             | -             | -             | -             |
| 8        | BARRE DE TENSION PLIABLE NEWTON 19po - ASSY | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 1             | -             | -             | -             |
| 9        | BARRE DE TENSION PLIABLE NEWTON 20po - ASSY | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 1             | -             | -             |
| 10       | BARRE DE TENSION PLIABLE NEWTON 21po - ASSY | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 1             | -             |
| 11       | BARRE DE TENSION PLIABLE NEWTON 22po - ASSY | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 1             |

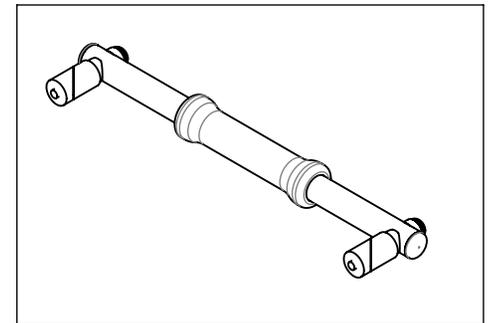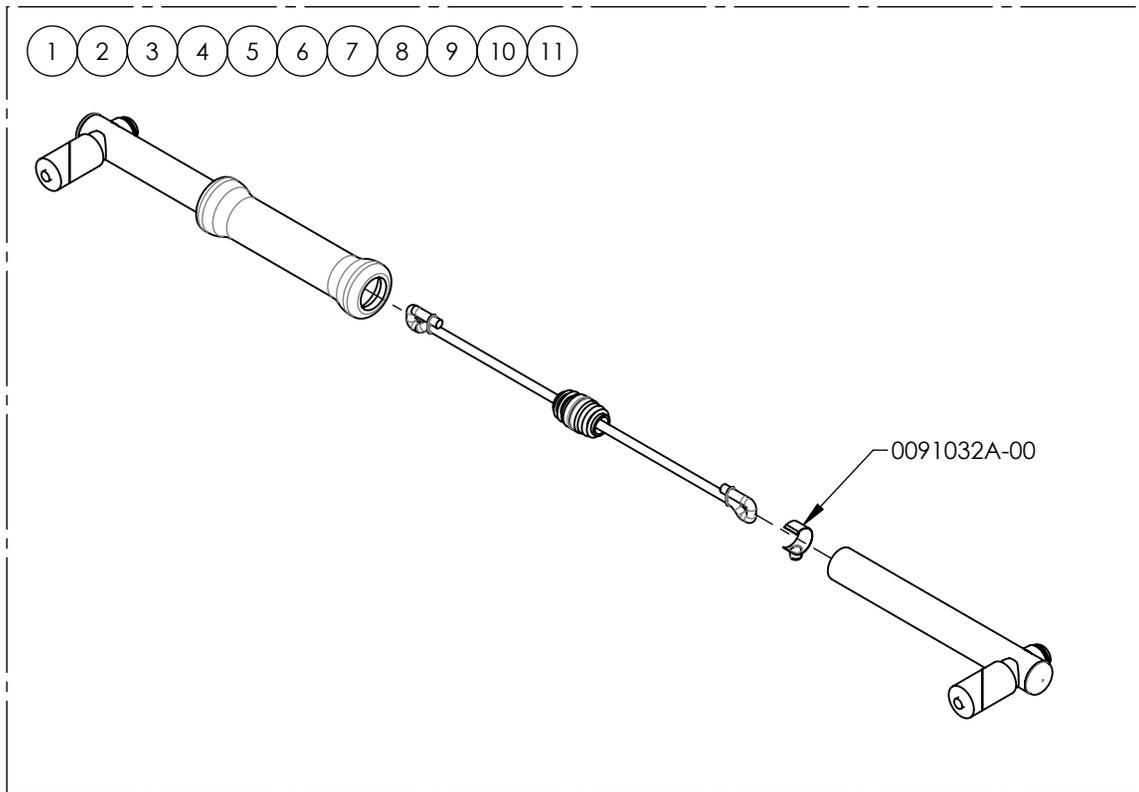


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001004A-00**  
**QUINCAILLERIE - SANS ANCRAGE**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                  | 9002850A-00/QTY. |
|----------|-------------|--|------------------|
| 1        | 0091019A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M6x1x40mm L, 12mm FILET      | 2                |
| 2        | 0099560A-00 | RONDELLE 1/4po, 17/64 ID, 1/2 OD, .032 ÉPAIS | 2                |
| 3        | 0099512A-00 | ÉCROU AUTOBLOQUANT M6x1                      | 2                |

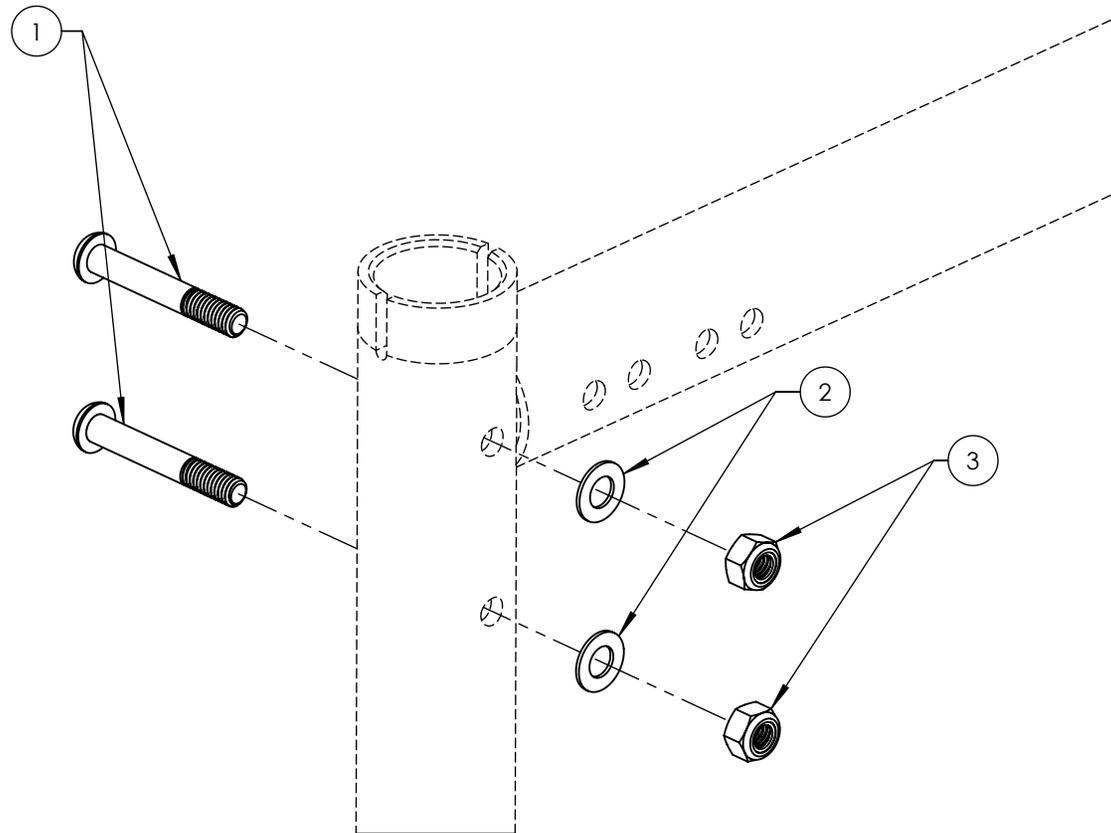


9001004A-00  
 QUINCAILLERIE - SANS ANCRAGE

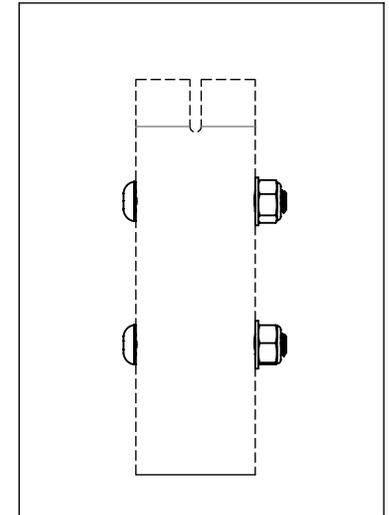


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001005B & 9001251B\_9001252B**  
**MONTANT DOSSIER - CARBONE, RÉGLABLE EN ANGLE, 8° À 8 po**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                 | 9001005 | 9001251 | 9001252 |
|----------|-------------|---|---------|---------|---------|
| 1        | 0032523B-00 | DOSSIER CARBONE 8 DEG AJUST 13½-15po - ASSY | 1       | -       | -       |
| 2        | 0032524B-00 | DOSSIER CARBONE 8 DEG AJUST 15-18po - ASSY  | -       | 1       | -       |
| 3        | 0032525B-00 | DOSSIER CARBONE 8 DEG AJUST 18-21po - ASSY  | -       | -       | 1       |
| 4        | 0032037B-00 | DOSSIER AJUSTABLE BAS (M)                   | 1       | 1       | 1       |
| 5        | 0090663A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M6x1x25mm L                 | 2       | 2       | 2       |

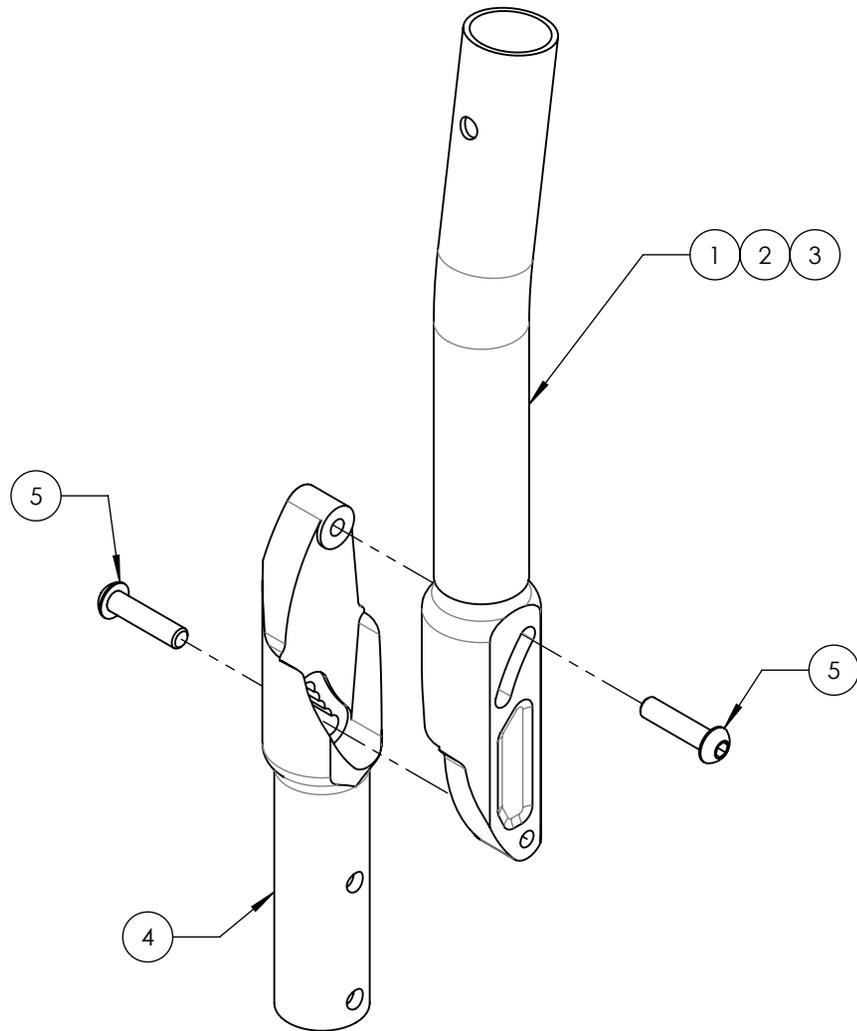


9001005B-00  
MONTANT - CARBONE,  
ANGLE AJUST, 8°@8po,  
13½-15po

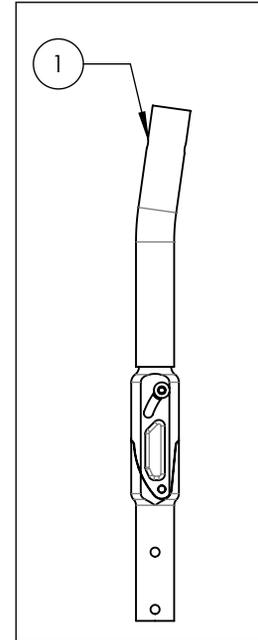

9001251B-00  
MONTANT -  
CARBONE, ANGLE  
AJUST, 8°@8po, 15-  
18po

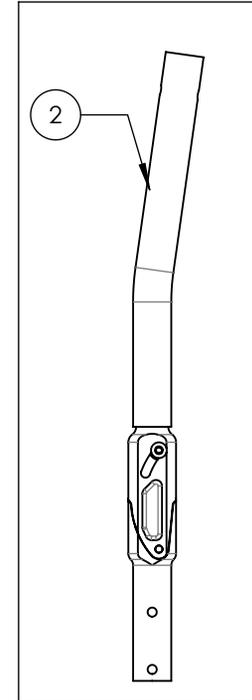



9001252B-00  
MONTANT -  
CARBONE, ANGLE  
AJUST, 8°@8po, 18-  
21po

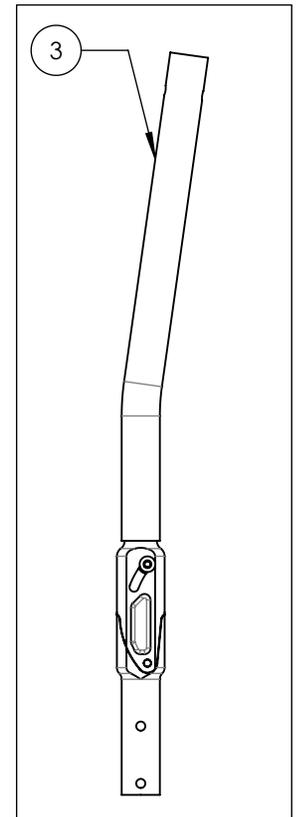

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001173A-00**  
**QUINCAILLERIE - POUR ANCRAGE**



| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                             | QTÉ |
|----------|-------------|---|-----|
| 1        | 0032066A-00 | RONDELLE DOMÉ DOUBLE                    | 2   |
| 2        | 0091004A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M6x1x65mm L, 24mm FILET | 2   |
| 3        | 0099512A-00 | ÉCROU AUTOBLOQUANT M6x1                 | 2   |
| 4        | 0099562A-00 | RONDELLE 1/4po                          | 4   |

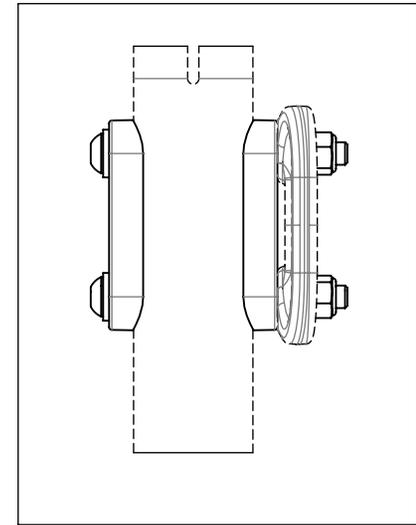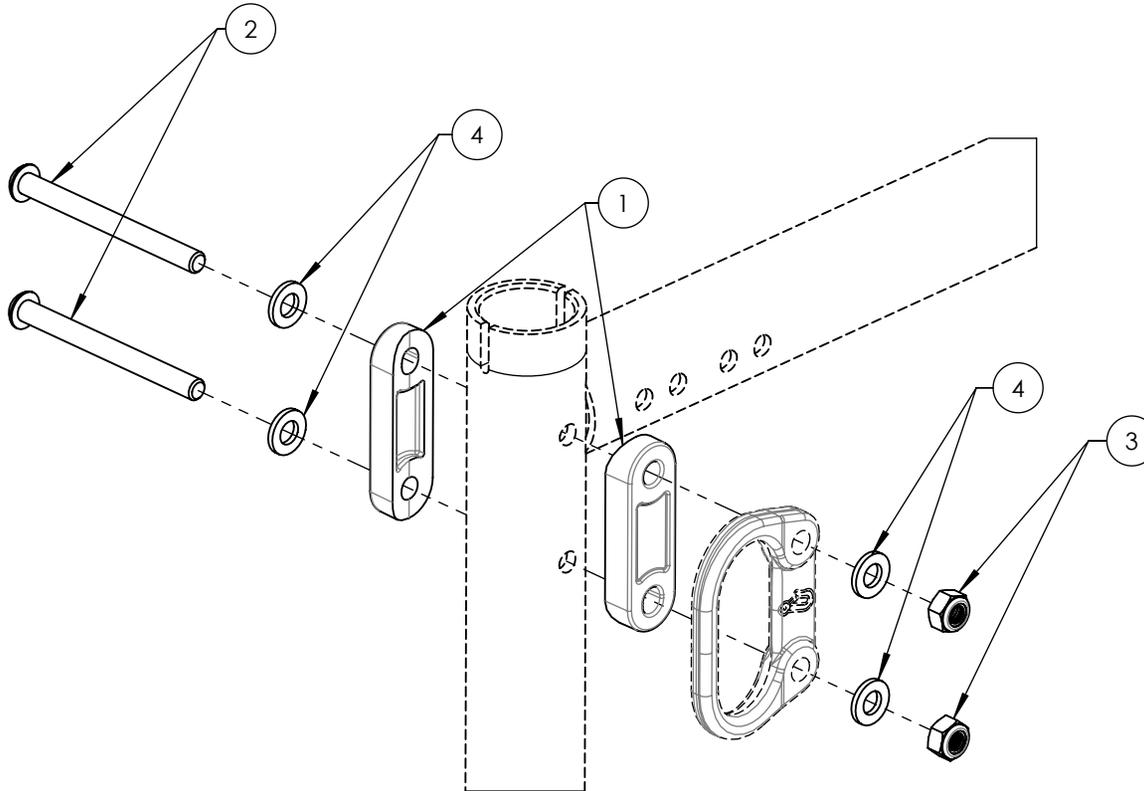

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001175A-00**  
**QUINCAILLERIE - POUR APPUI-BRAS U**



| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                  | QTÉ. |
|----------|-------------|--|------|
| 1        | 0032066A-00 | RONDELLE DOMÉ DOUBLE                         | 1    |
| 2        | 0090669A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M6x1x55mm L, 24mm FILET      | 1    |
| 3        | 0091004A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M6x1x65mm L, 24mm FILET      | 1    |
| 4        | 0099560A-00 | RONDELLE 1/4po, 17/64 ID, 1/2 OD, .032 ÉPAIS | 2    |
| 5        | 0099512A-00 | ÉCROU AUTOBLOQUANT M6x1                      | 2    |
| 6        | 0099562A-00 | RONDELLE 1/4po                               | 2    |

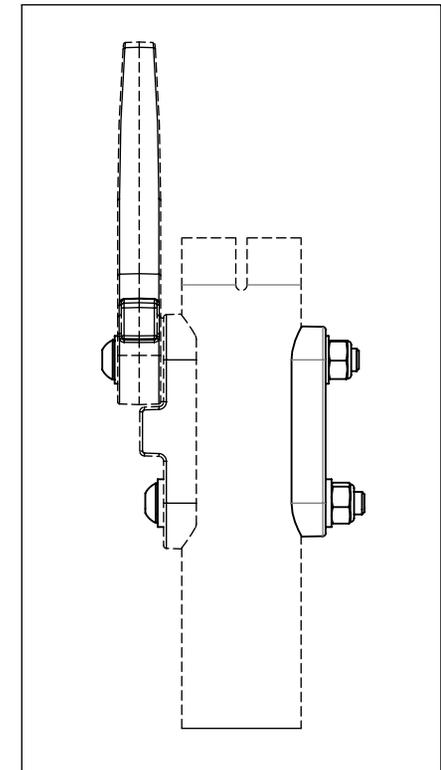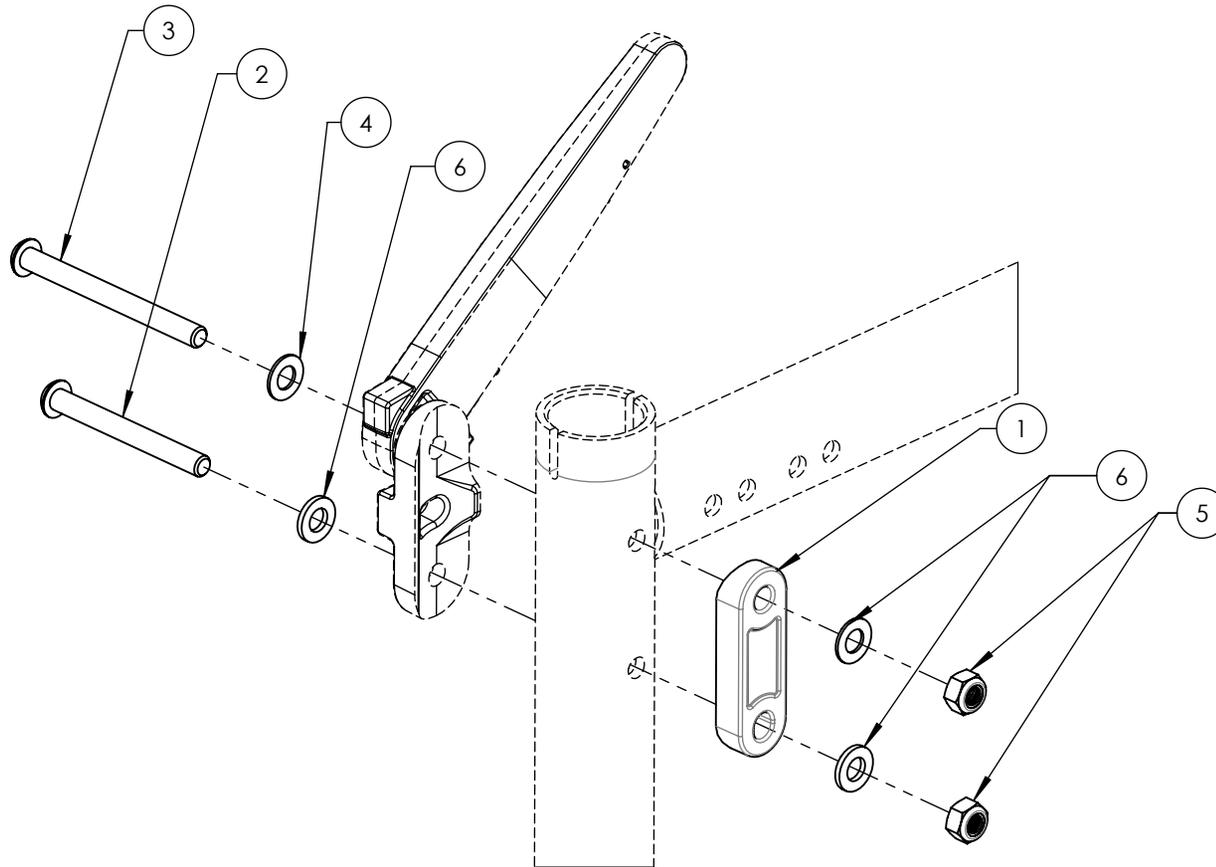

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001233A-00**  
**QUINCAILLERIE - POUR APPUI-BRAS U AVEC ANCRAGE**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                  | QTÉ. |
|----------|-------------|--|------|
| 1        | 0032066A-00 | RONDELLE DOMÉ DOUBLE                         | 1    |
| 2        | 0090670A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M6x1x58mm L, 24mm FILET      | 1    |
| 3        | 0090982A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M6x1x70mm L, 24mm FILET      | 1    |
| 4        | 0099560A-00 | RONDELLE 1/4po, 17/64 ID, 1/2 OD, .032 ÉPAIS | 2    |
| 5        | 0099512A-00 | ÉCROU AUTOBLOQUANT M6x1                      | 2    |

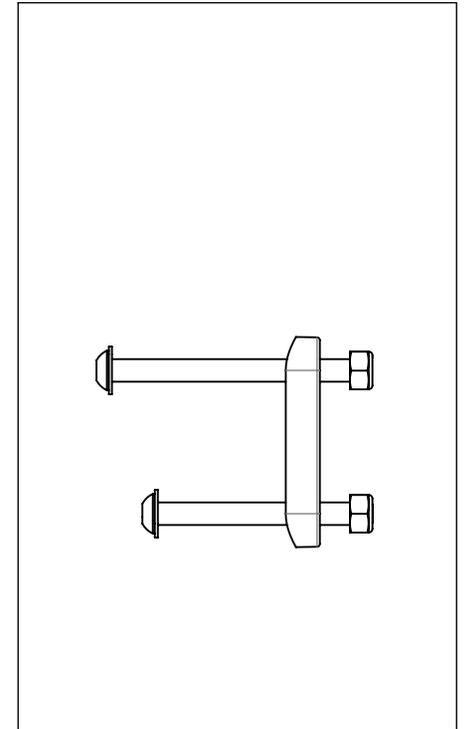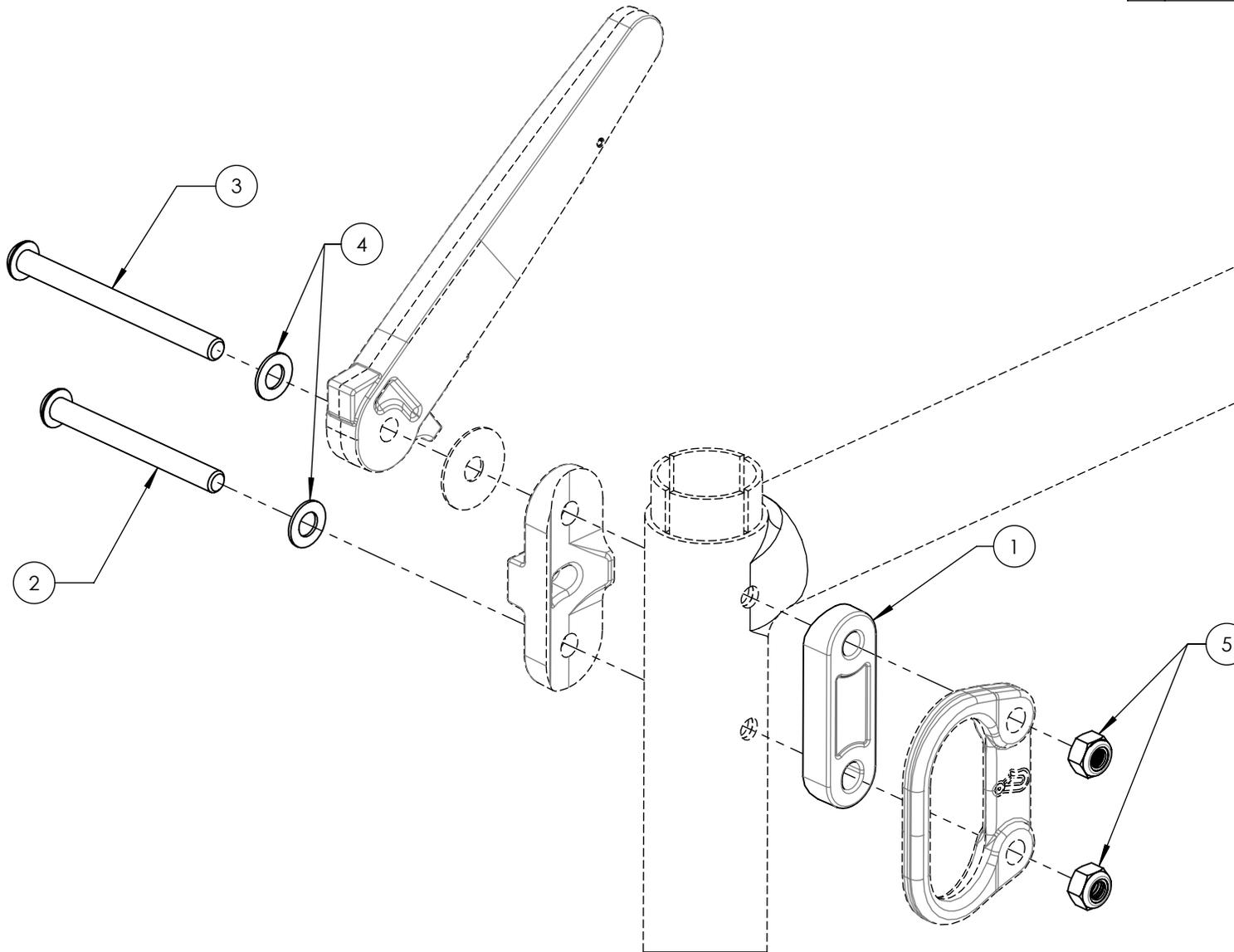


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001247B\_9001250B**  
**MONTANT DOSSIER - CARBONE, RÉGLABLE EN ANGLE, DROIT**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                          | 9001247 | 9001248 | 9001249 | 9001250 |
|----------|-------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1        | 0032520B-00 | DOSSIER CARBONE AJUST 14-15po - ASSY | 1       | -       | -       | -       |
| 2        | 0032521B-00 | DOSSIER CARBONE AJUST 15-18po - ASSY | -       | 1       | -       | -       |
| 3        | 0032522B-00 | DOSSIER CARBONE AJUST 18-21po - ASSY | -       | -       | 1       | -       |
| 4        | 0032527B-00 | DOSSIER CARBONE AJUST 21-24po - ASSY | -       | -       | -       | 1       |
| 5        | 0032037B-00 | DOSSIER AJUSTABLE BAS (M)            | 1       | 1       | 1       | 1       |
| 6        | 0090663A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M6x1x25mm L          | 2       | 2       | 2       | 2       |

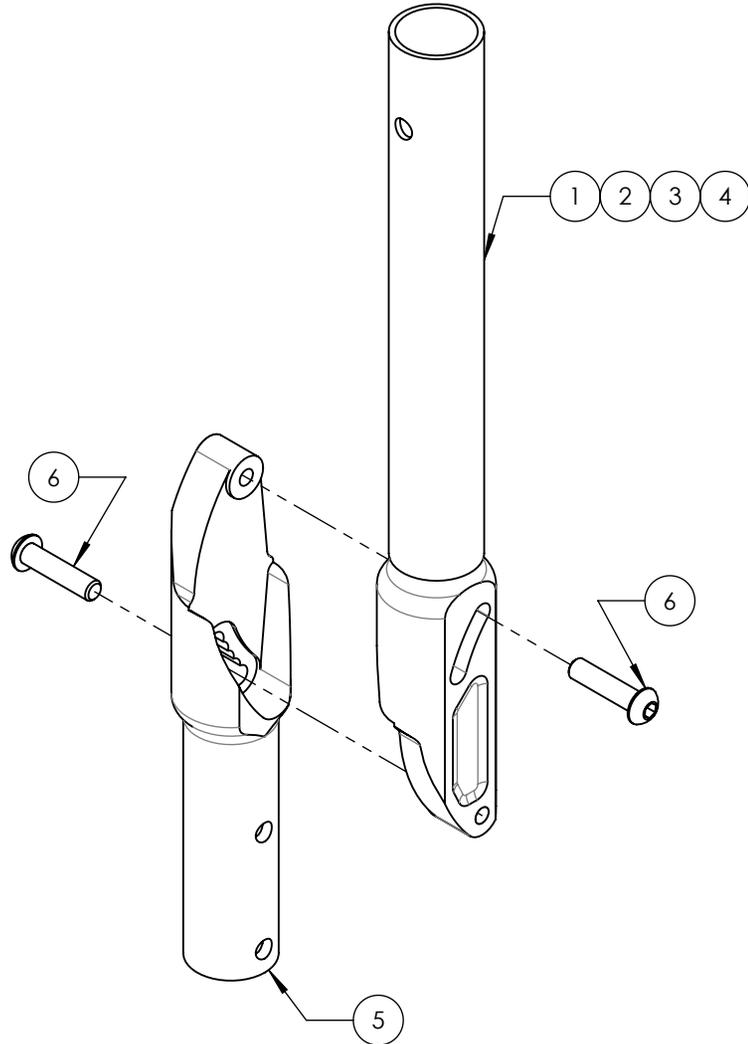


9001247B-00  
MONTANT -  
CARBONE, ANGLE  
AJUST, DROIT, 12-  
15po

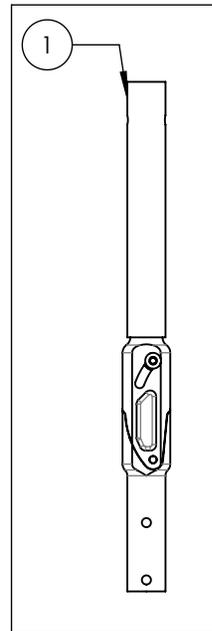


9001248B-00  
MONTANT -  
CARBONE, ANGLE  
AJUST, DROIT, 15-  
18po

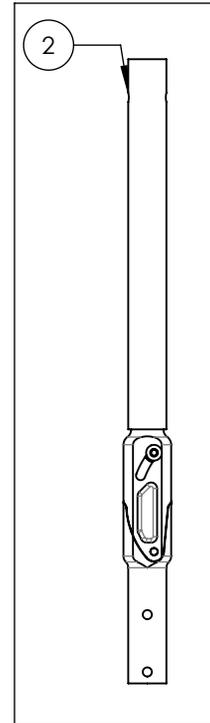

9001249B-00  
MONTANT -  
CARBONE, ANGLE  
AJUST, DROIT, 18-  
21po

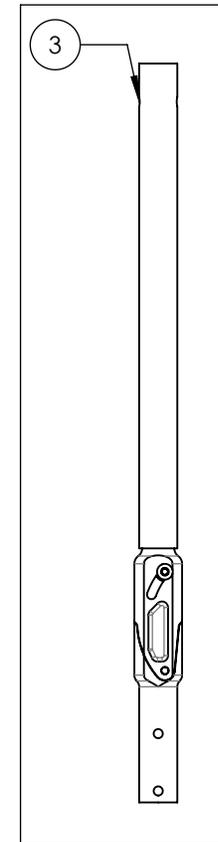


9001250B-00  
MONTANT -  
CARBONE, ANGLE  
AJUST, DROIT, 21-  
24po

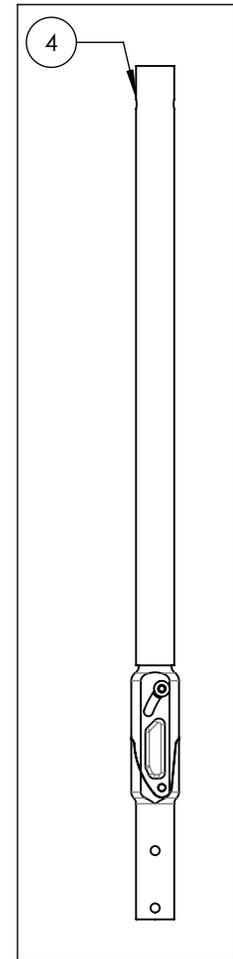


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001253B\_9001256B**  
**MONTANT DOSSIER - CARBONE, DROIT, FIXE**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                         | 9001253 | 9001254 | 9001255 | 9001256 |
|----------|-------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1        | 0032039B-00 | DOSSIER CARBONE DROIT 12po FIXE (M) | 1       | -       | -       | -       |
| 2        | 0032040B-00 | DOSSIER CARBONE DROIT 15po FIXE (M) | -       | 1       | -       | -       |
| 3        | 0032041B-00 | DOSSIER CARBONE DROIT 18po FIXE (M) | -       | -       | 1       | -       |
| 4        | 0032042B-00 | DOSSIER CARBONE DROIT 21po FIXE (M) | -       | -       | -       | 1       |
| 5        | 0099704A-00 | BOUCHON 1po (CARBONE)               | 1       | 1       | 1       | 1       |

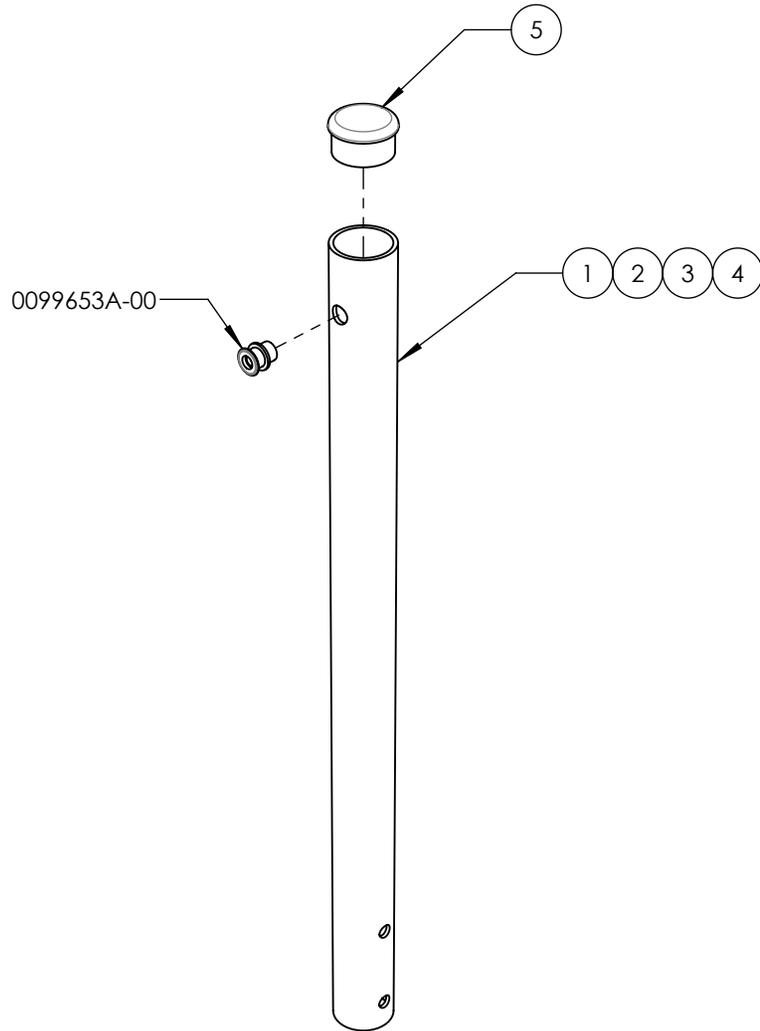


9001253B-00  
MONTANT -  
CARBONE, DROIT,  
FIXE, 12po

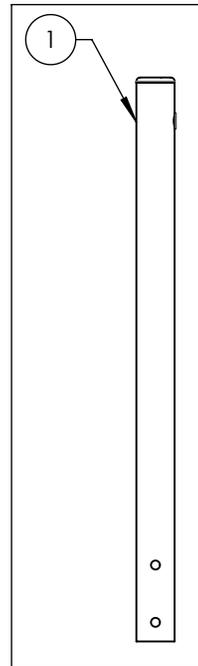


9001254B-00  
MONTANT -  
CARBONE, DROIT,  
FIXE, 15po

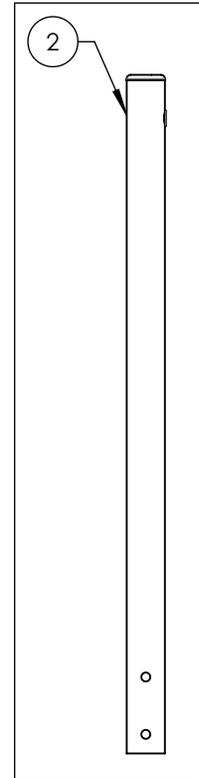

9001255B-00  
MONTANT -  
CARBONE, DROIT,  
FIXE, 18po

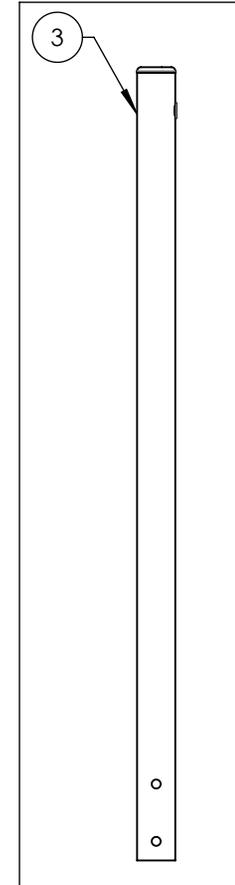


9001256B-00  
MONTANT -  
CARBONE, DROIT,  
FIXE, 21po

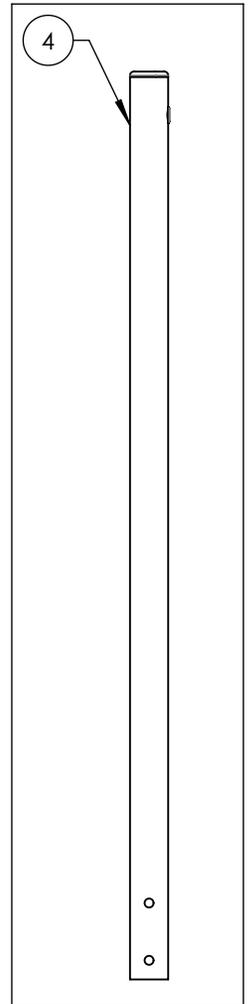


**9001257B 9001259B**  
**MONTANT DOSSIER - CARBONE, 8° À 8 po, FIXE**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                       | 9001257 | 9001258 | 9001259 |
|----------|-------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| 1        | 0032043C-00 | DOSSIER CARBONE 8 DEG FIXE 13.5po | 1       | -       | -       |
| 2        | 0032044C-00 | DOSSIER CARBONE 8 DEG FIXE 15po   | -       | 1       | -       |
| 3        | 0032045C-00 | DOSSIER CARBONE 8 DEG FIXE 18po   | -       | -       | 1       |
| 4        | 0099704A-00 | BOUCHON 1po (CARBONE)             | 1       | 1       | 1       |
| 5        | 0099653A-00 | RIVET FILETÉ M5x0.8 (3.3-5.7MM)   | 1       | 1       | 1       |

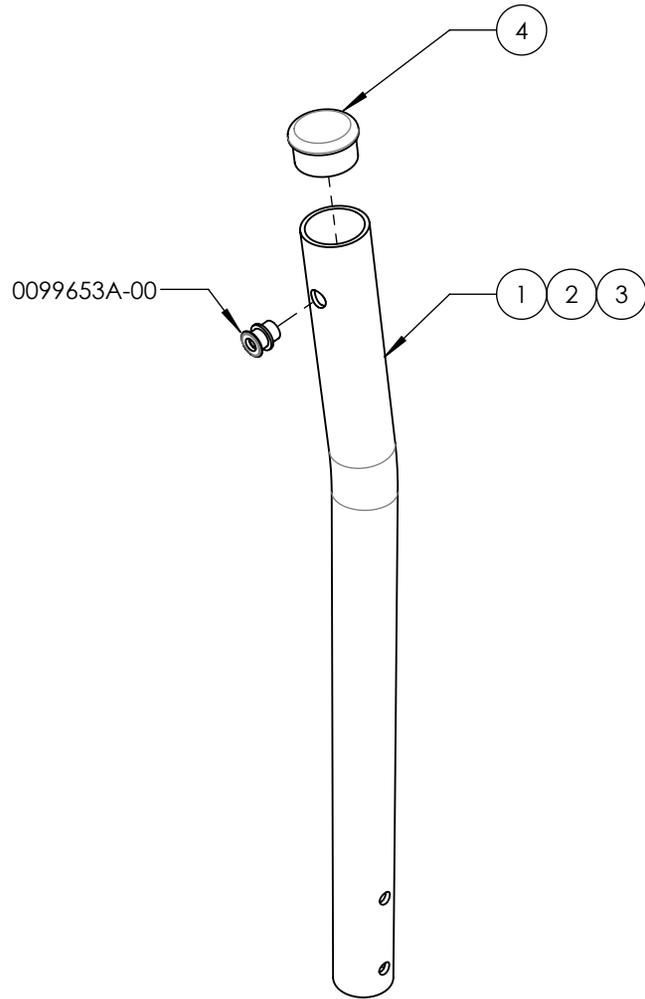


9001257B-00  
MONTANT -  
CARBONE, 8°@8po,  
FIXE, 13½po

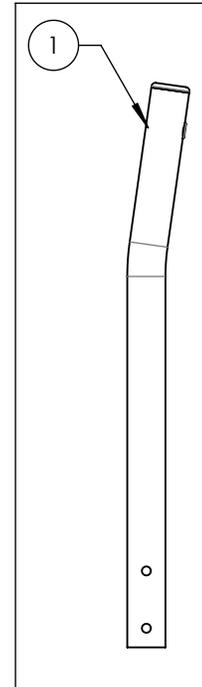

9001258B-00  
MONTANT -  
CARBONE, 8°@8po,  
FIXE, 15po

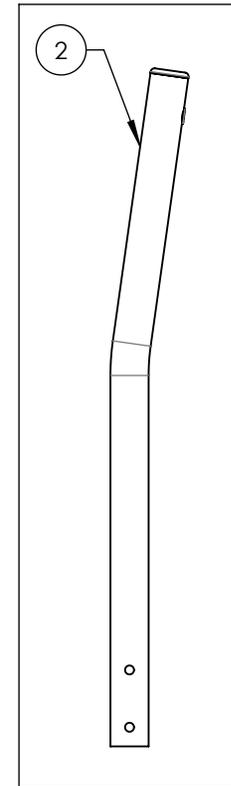


9001259B-00  
MONTANT -  
CARBONE, 8°@8po,  
FIXE, 18po

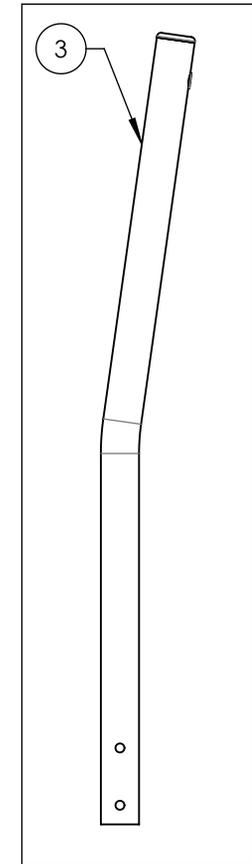


**9001260B\_9001263B**  
**MONTANT DOSSIER - CARBONE, RÉGLABLE EN ANGLE, FIXE**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                          | 9001260 | 9001261 | 9001262 | 9001263 |
|----------|-------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1        | 0032520B-00 | DOSSIER CARBONE AJUST 14-15po - ASSY | 1       | -       | -       | -       |
| 2        | 0032521B-00 | DOSSIER CARBONE AJUST 15-18po - ASSY | -       | 1       | -       | -       |
| 3        | 0032522B-00 | DOSSIER CARBONE AJUST 18-21po - ASSY | -       | -       | 1       | -       |
| 4        | 0032527B-00 | DOSSIER CARBONE AJUST 21-24po - ASSY | -       | -       | -       | 1       |
| 5        | 0032037B-00 | DOSSIER AJUSTABLE BAS (M)            | 1       | 1       | 1       | 1       |
| 6        | 0099704A-00 | BOUCHON 1po (CARBONE)                | 1       | 1       | 1       | 1       |
| 7        | 0090663A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M6x1x25mm L          | 2       | 2       | 2       | 2       |

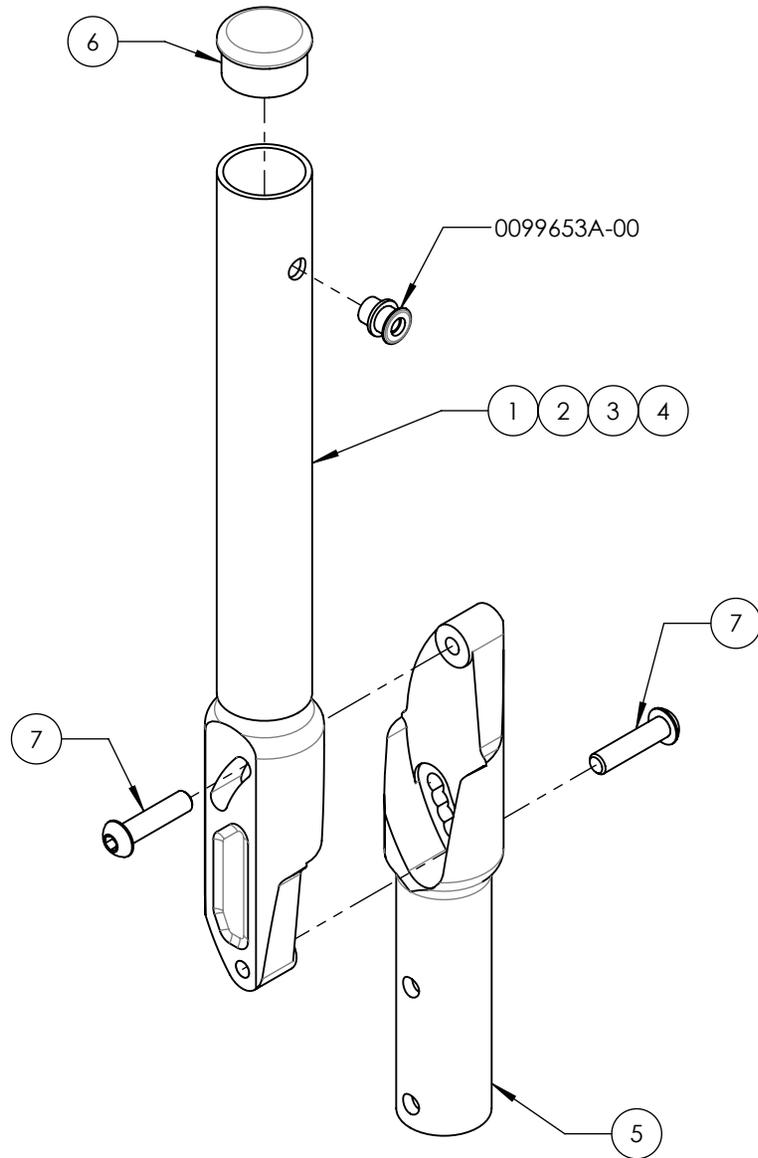


9001260B-00  
MONTANT -  
CARBONE, ANGLE  
AJUST, FIXE, 12po

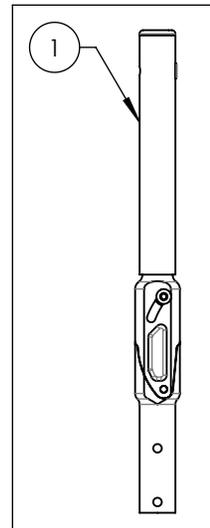


9001261B-00  
MONTANT -  
CARBONE, ANGLE  
AJUST, FIXE, 15po

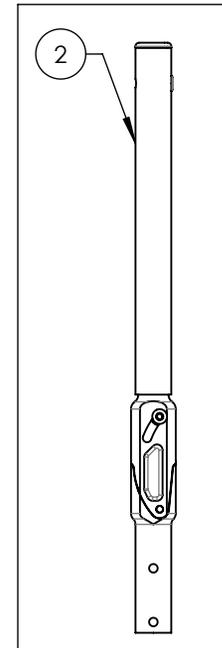

9001262B-00  
MONTANT -  
CARBONE, ANGLE  
AJUST, FIXE, 18po

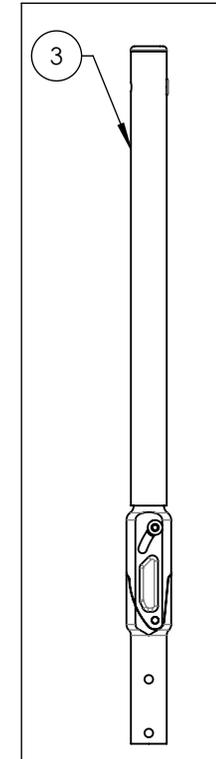


9001263B-00  
MONTANT -  
CARBONE, ANGLE  
AJUST, FIXE, 21po

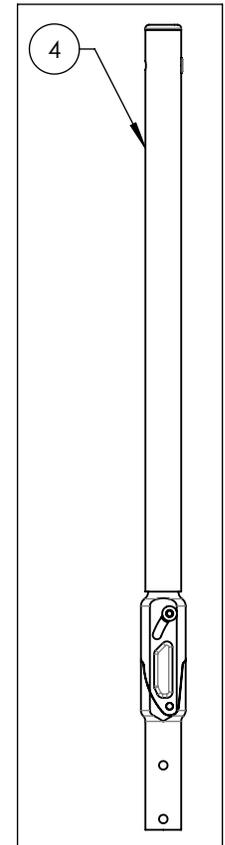


**9001271A\_9001272A**  
**MONTANT - ALU, ANGLE AJUST, DROIT**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                 | 9001271 | 9001272 |
|----------|-------------|-----------------------------|---------|---------|
| 1        | 0032548A-00 | DOSSIER ALU AJUST 15-18po   | 1       | -       |
| 2        | 0032549A-00 | DOSSIER ALU AJUST 18-21po   | -       | 1       |
| 3        | 0032037B-00 | DOSSIER AJUSTABLE BAS (M)   | 1       | 1       |
| 4        | 0090663A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M6x1x25mm L | 2       | 2       |

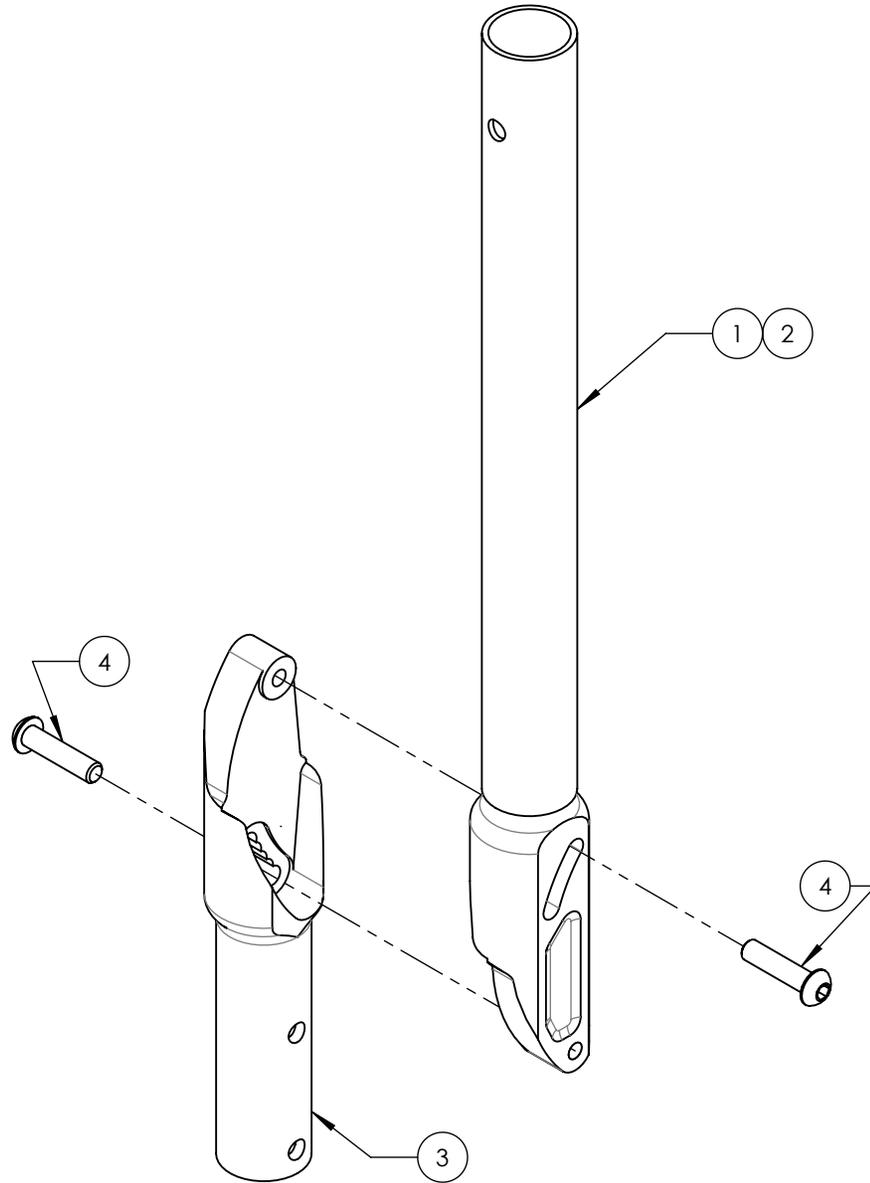

9001271A-00  
MONTANT - ALU, ANGLE  
AJUST, DROIT

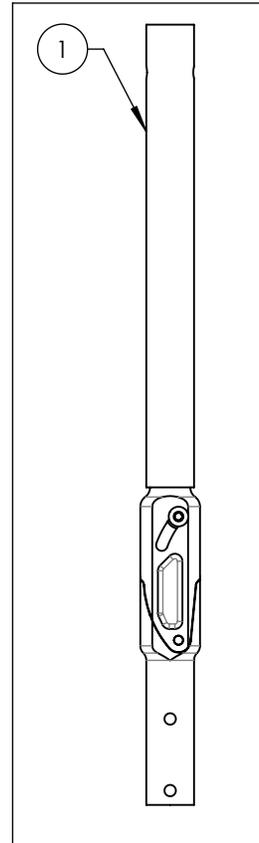


9001272A-00  
MONTANT - ALU, ANGLE  
AJUST, DROIT

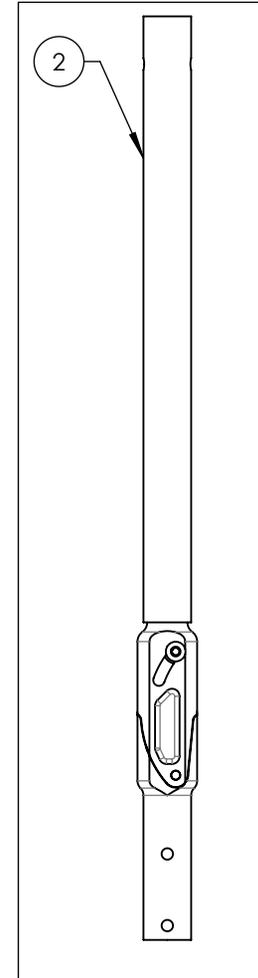


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001273A\_9001274A**  
**MONTANT - ALU, ANGLE AJUST, 8°@8po**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                            | 9001273 | 9001274 |
|----------|-------------|--|---------|---------|
| 1        | 0032550A-00 | DOSSIER ALU 8 DEG AJUST 15-18po - ASSY | 1       | -       |
| 2        | 0032551A-00 | DOSSIER ALU 8 DEG AJUST 18-21po - ASSY | -       | 1       |
| 3        | 0032037B-00 | DOSSIER AJUSTABLE BAS (M)              | 1       | 1       |
| 4        | 0090663A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M6x1x25mm L            | 2       | 2       |

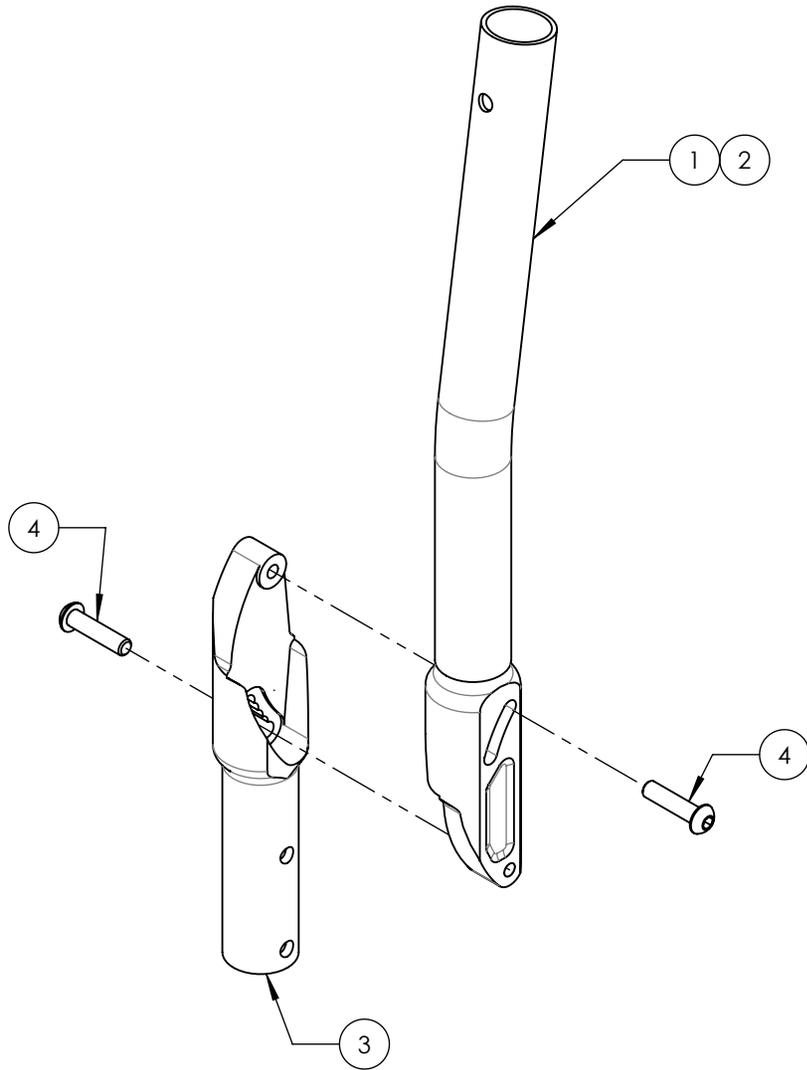

9001273A-00  
MONTANT - ALU, ANGLE  
AJUST, 8°@8po, 15-18po

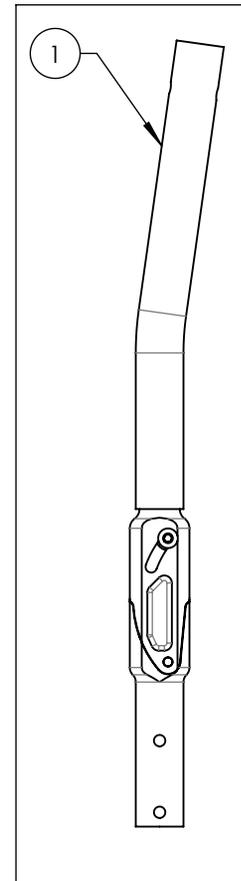



9001274A-00  
MONTANT - ALU, ANGLE  
AJUST, 8°@8po, 18-21po

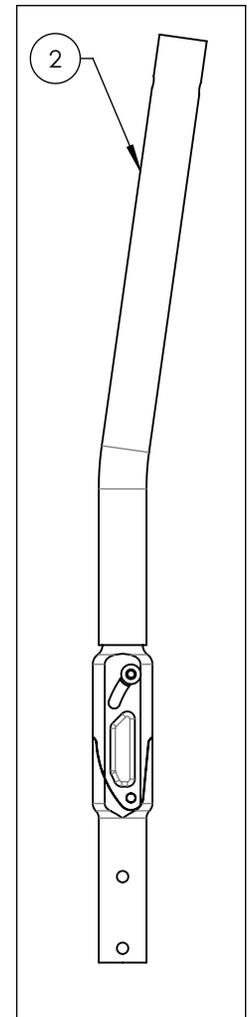

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001275A-00**  
**MONTANT - ALU, IPH, 8°@8po, 16, 18 OU 20po**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                | QTÉ. |
|----------|-------------|--|------|
| 1        | 0032500A-00 | DOSSIER ALU 8 DEG IPH 16, 18 & 20po - ASSY | 1    |
| 2        | 0090647A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M5x0.8x18mm L              | 1    |

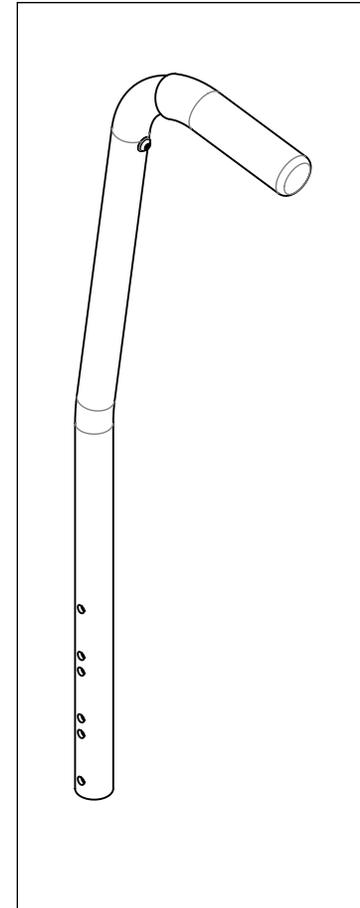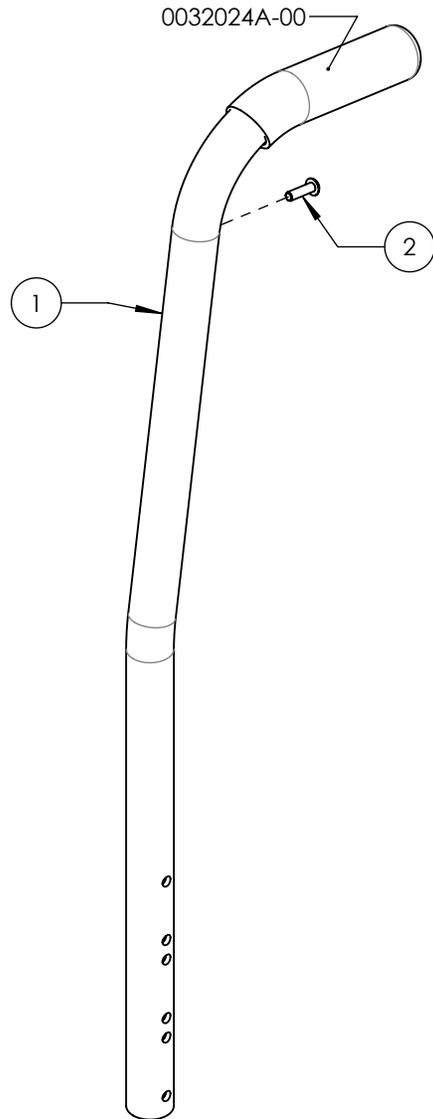


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001276A 9001277A**  
**MONTANT DE DOSSIER - ALUMINIUM, RÉGLABLE EN ANGLE,**  
**8° À 8 po AVEC POIGNÉE INTÉGRÉE**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                             | 9001276 | 9001277 |
|----------|-------------|---|---------|---------|
| 1        | 0032501A-00 | DOSSIER ALU 8 DEG AJUST IPH 16po - ASSY | 1       | -       |
| 2        | 0032502A-00 | DOSSIER ALU 8 DEG AJUST IPH 20po - ASSY | -       | 1       |
| 3        | 0032037B-00 | DOSSIER AJUSTABLE BAS (M)               | 1       | 1       |
| 4        | 0090663A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M6x1x25mm L             | 2       | 2       |
| 5        | 0090647A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M5x0.8x18mm L           | 1       | 1       |

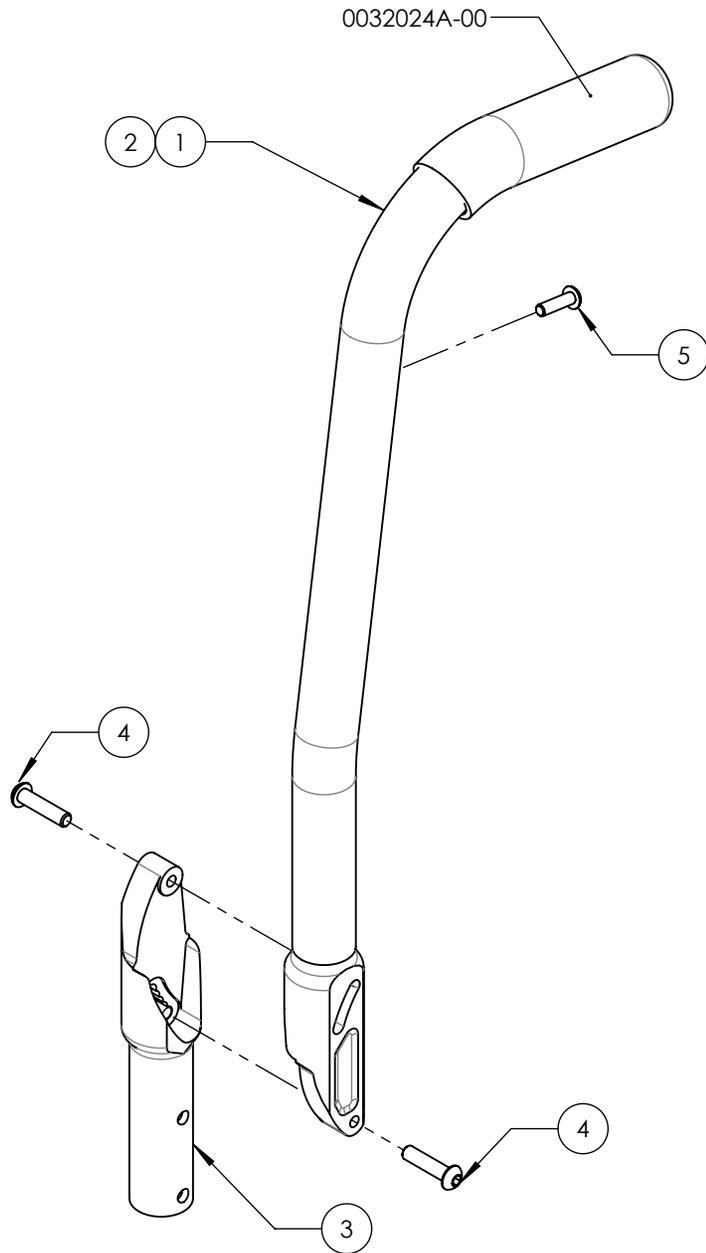

9001276A-00  
 MONTANT - ALU, IPH, ANGLE AJUST,  
 8°@8po, 16po

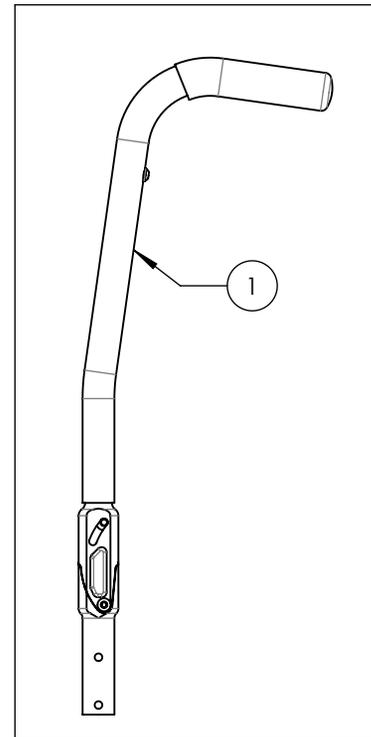


9001277A-00  
 MONTANT - ALU, IPH, ANGLE AJUST,  
 8°@8po, 20po

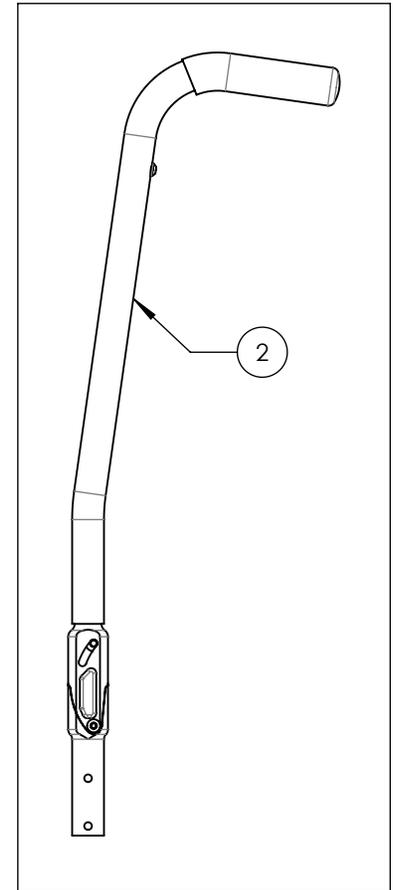


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001285A & 9002915A  
STANDARD & HD PUSH HANDLE - ADJUSTABLE**



| ITEM NO. | PARTNO      | DESCRIPTION                          | 9001285 | 9002915 | REPLACEMENT PARTS |
|----------|-------------|--------------------------------------|---------|---------|-------------------|
| 1        |             | PUSH HANDLE 7/8in - ASSY             | 1       | -       | -                 |
| 2        | 0032533A-00 | HD PUSH HANDLE 7/8in - ASSY          | -       | 1       | -                 |
| 3        | 0032017B-00 | PUSH HANDLE BACK SLEEVE              | 1       | 1       | -                 |
| 4        | 0032514B-00 | DOWEL NUT PUSH HANDLE - ASSEMBLY (M) | -       | -       | 1                 |

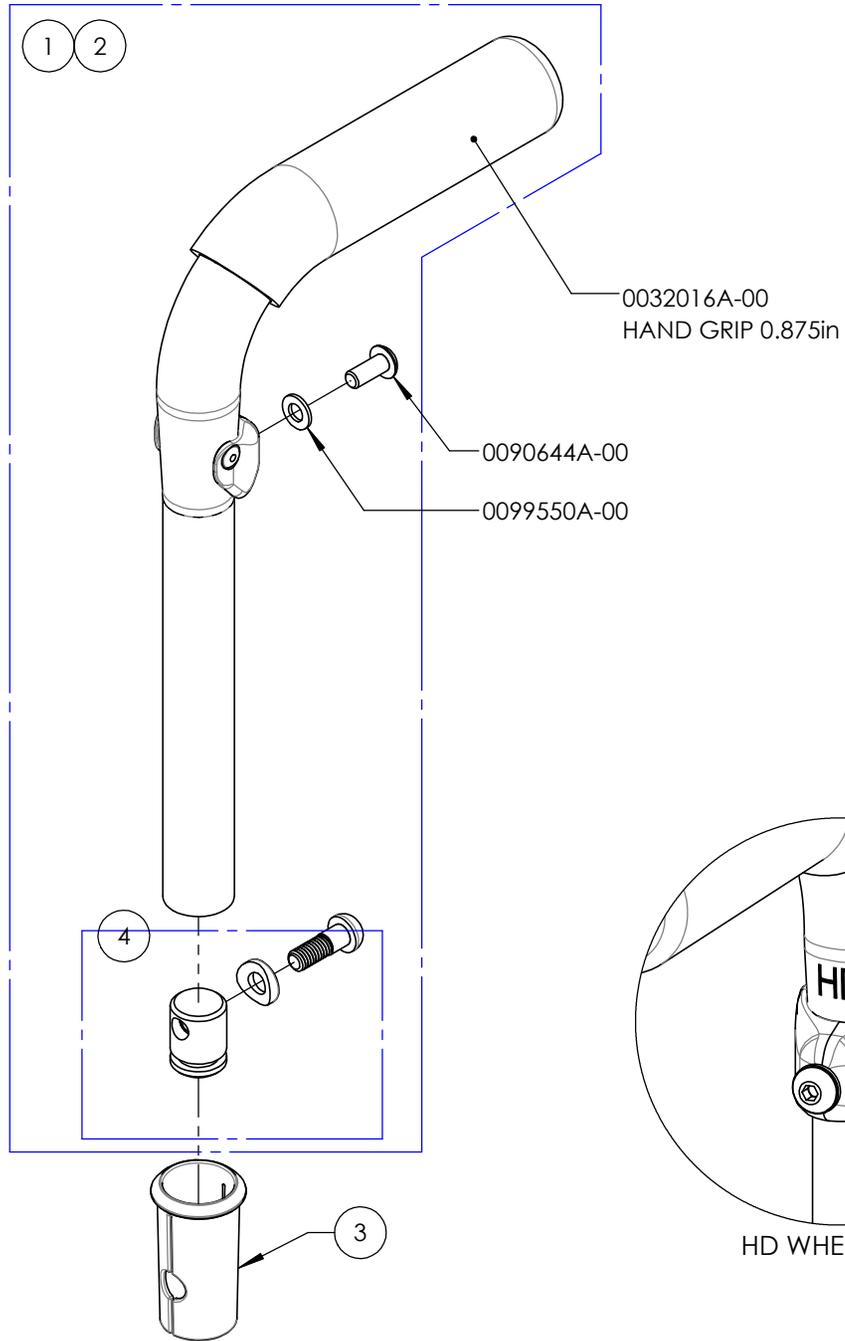

9001285A-00  
PUSH HANDLE - STD

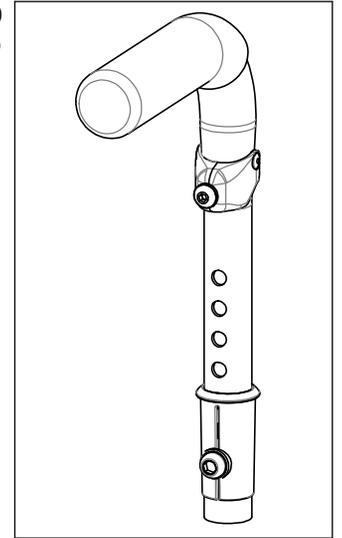

9002915A-00  
PUSH HANDLE - HD

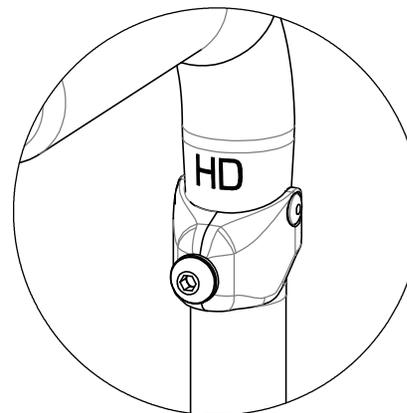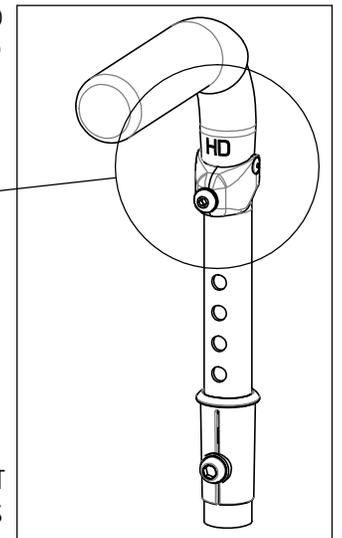


HD WHEELCHAIRS AND STROLLER HANDLE USERS MUST  
USE THE HD VERSION OF THE PUSH HANDLES


MAKE SURE TO HAVE YOUR SERIAL NUMBER  
NEARBY WHEN ORDERING PARTS FOR YOUR  
MOTION COMPOSITES WHEELCHAIR

**9001285A & 9002915A  
POIGNÉE DE POUSSÉE - AJUSTABLE**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                   | 9001285 | 9002915 | REPLACEMENT PIÈCES |
|----------|-------------|---|---------|---------|--------------------|
| 1        | 0032507B-00 | POIGNÉE DE POUSSÉE ¾po - ASSY                 | 1       | -       | -                  |
| 2        | 0032533A-00 | POIGNÉE DE POUSSÉE HD ¾po - ASSY              | -       | 1       | -                  |
| 3        | 0032017B-00 | MANCHON POIGNÉE DE POUSSÉE                    | 1       | 1       | -                  |
| 4        | 0032514B-00 | DOWEL NUT POIGNÉE DE POUSSÉE - ASSEMBLAGE (M) | -       | -       | 1                  |

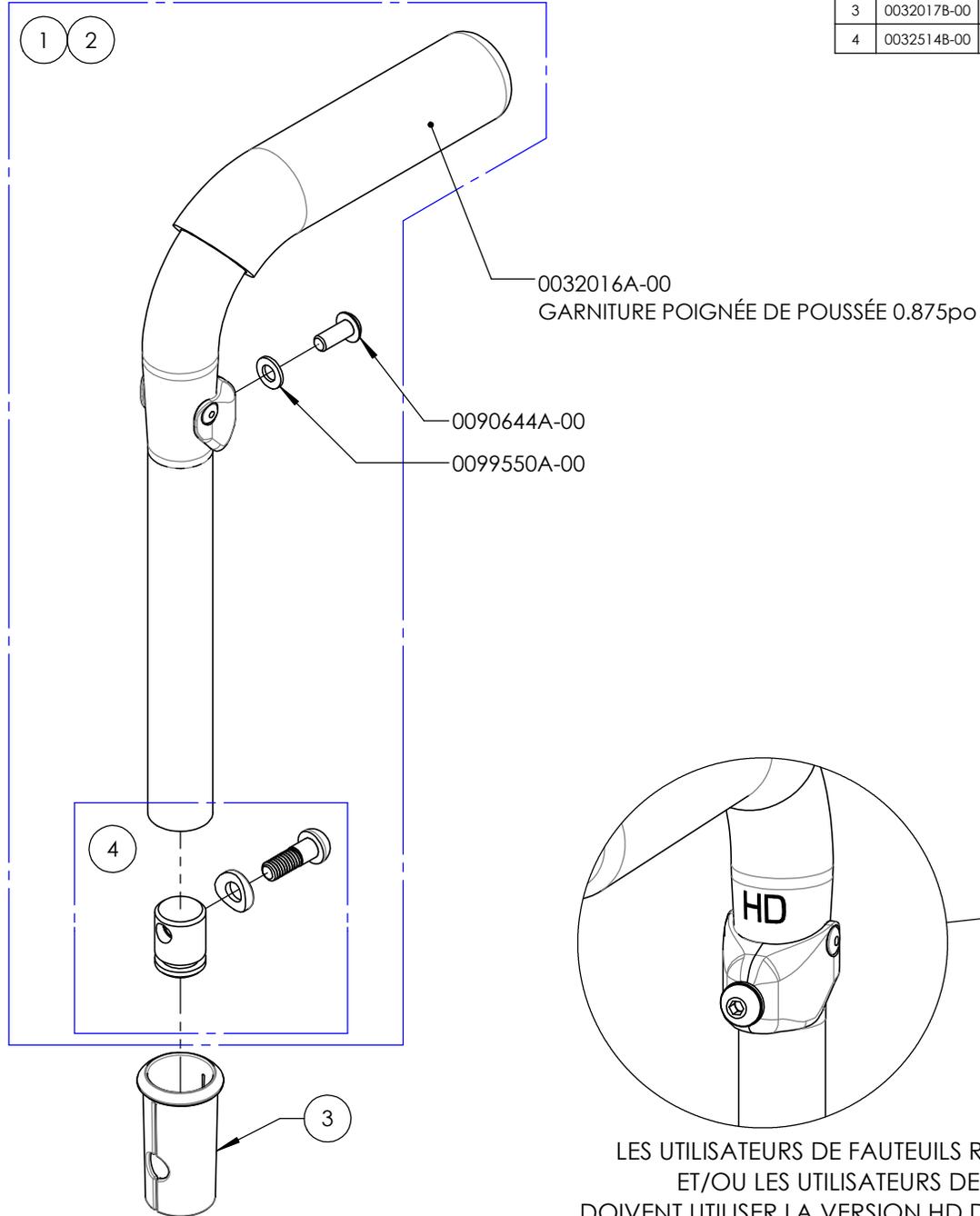

9001285A-00  
POIGNÉE DE POUSSÉE - STD

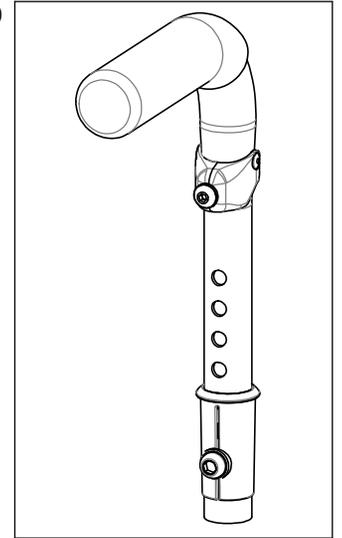

9002915A-00  
POIGNÉE DE POUSSÉE - HD


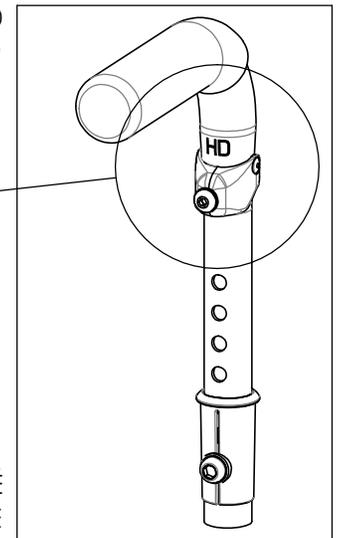


LES UTILISATEURS DE FAUTEUILS ROULANTS HAUTE CAPACITÉ  
ET/OU LES UTILISATEURS DE LA POIGNÉE DE POUSSÉE  
DOIVENT UTILISER LA VERSION HD DE LA POIGNÉE DE POUSSÉE

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


**9001286A-00**  
**EXTENSION DROITE AJUST**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                    | QTÉ | REPLACEMENT PIÈCES |
|----------|-------------|--|-----|--------------------|
| 1        | 00325068-00 | EXTENSION DE DOSSIER DROITE - ASSY             | 1   | -                  |
| 2        | 00320178-00 | MANCHON POIGNÉE DE POUSSÉE                     | 1   | -                  |
| 3        | 00325148-00 | DO WEL NUT POIGNÉE DE POUSSÉE - ASSEMBLAGE (M) | -   | 1                  |

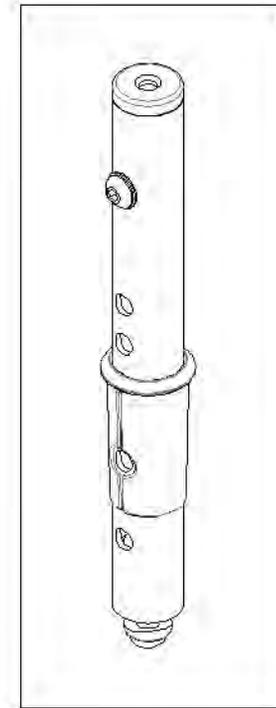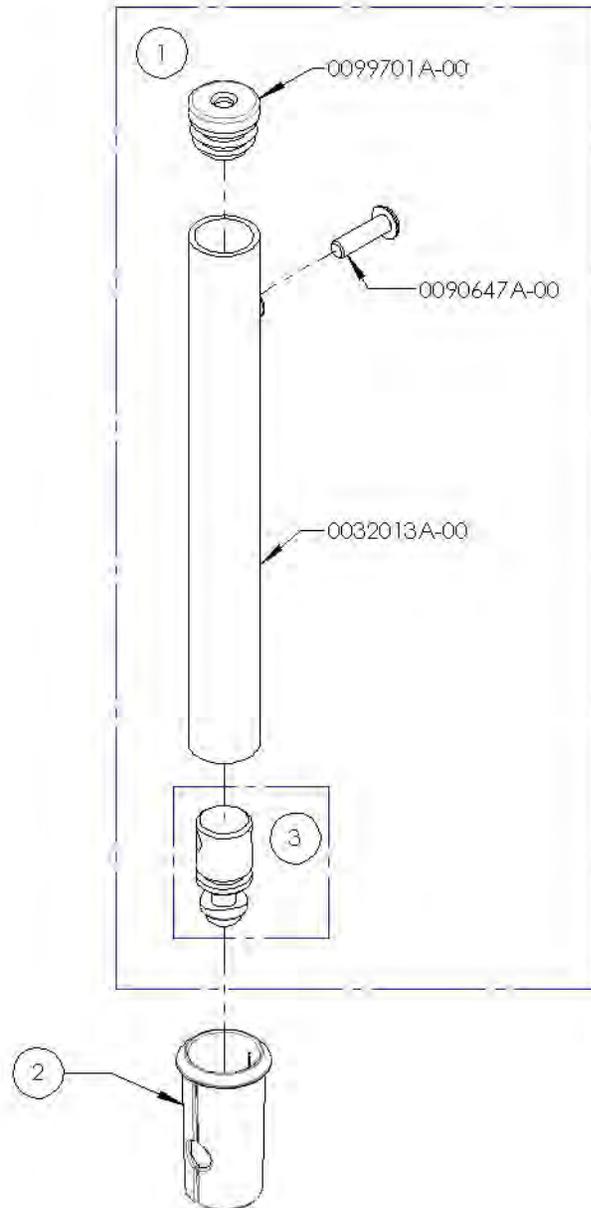


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001592A-00**  
**Barre de tension - Monture articulée & ancrage**

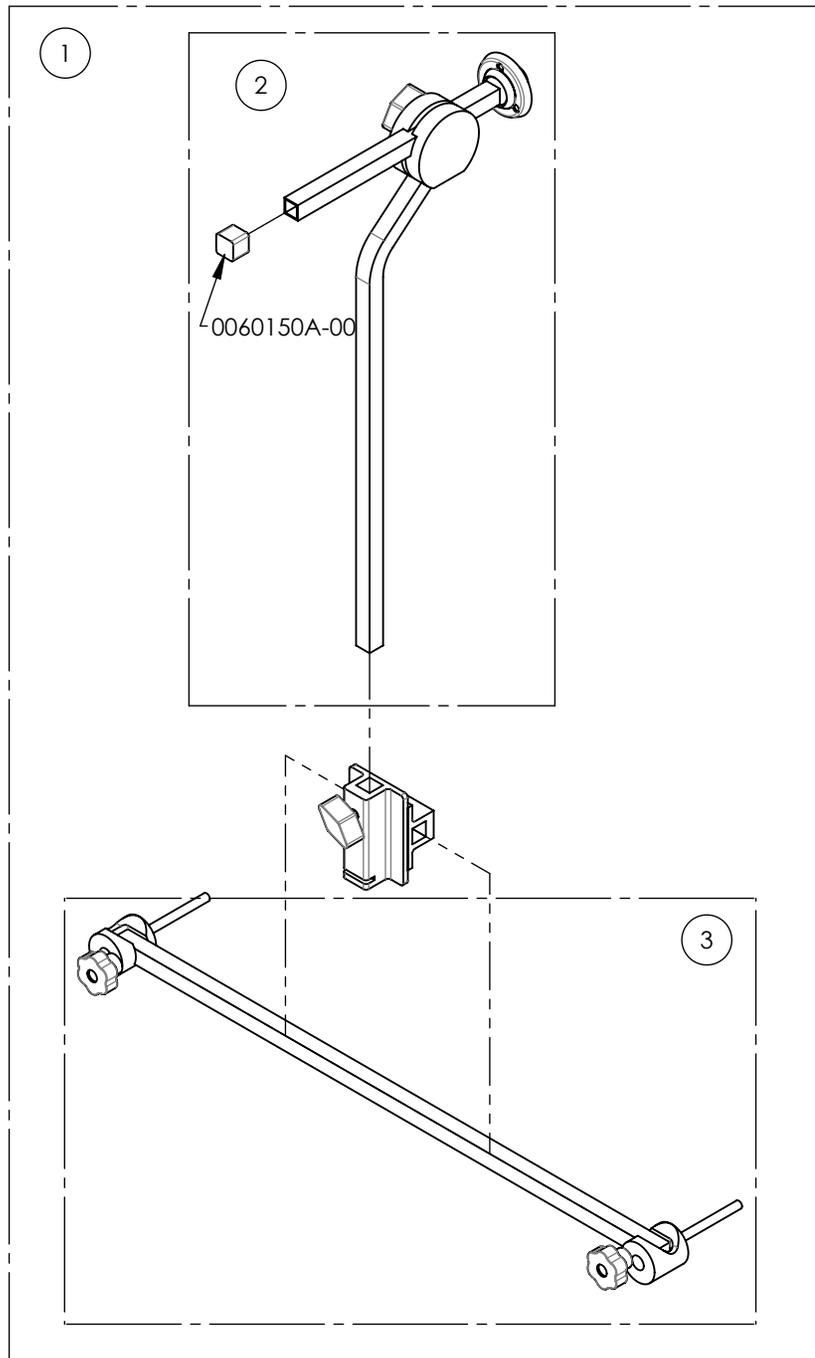



| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                   | QTÉ | REMPLACEMENT PIÈCES/QTÉ. |
|----------|-------------|---|-----|--------------------------|
| 1        | 0060701A-00 | KIT BARRE DE TENSION/PLAQUE/MONTURE ARTICULÉE | 1   | -                        |
| 2        | 0060108A-00 | MONTURE ARTICULÉE                             | -   | 1                        |
| 3        | 0060703A-00 | BARRE DE TENSION                              | -   | 1                        |

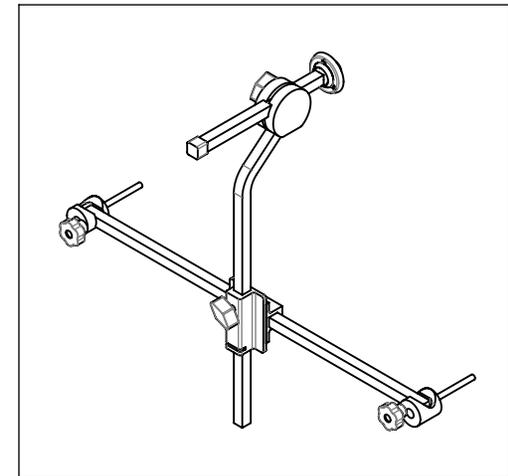

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001593A-00**  
**Barre de tension - Ancrage appui-tête**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                           | QTÉ | REPLACEMENT PIÈCES/QTÉ |
|----------|-------------|---------------------------------------|-----|------------------------|
| 1        | 0060702A-00 | KIT BARRE DE TENSION + PLAQUE ANCRAGE | 1   | -                      |
| 2        | 0060703A-00 | BARRE DE TENSION                      | -   | 1                      |

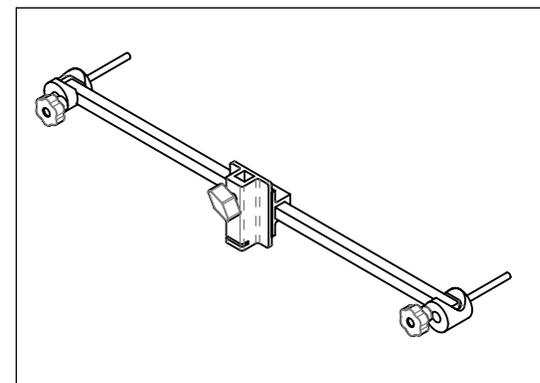
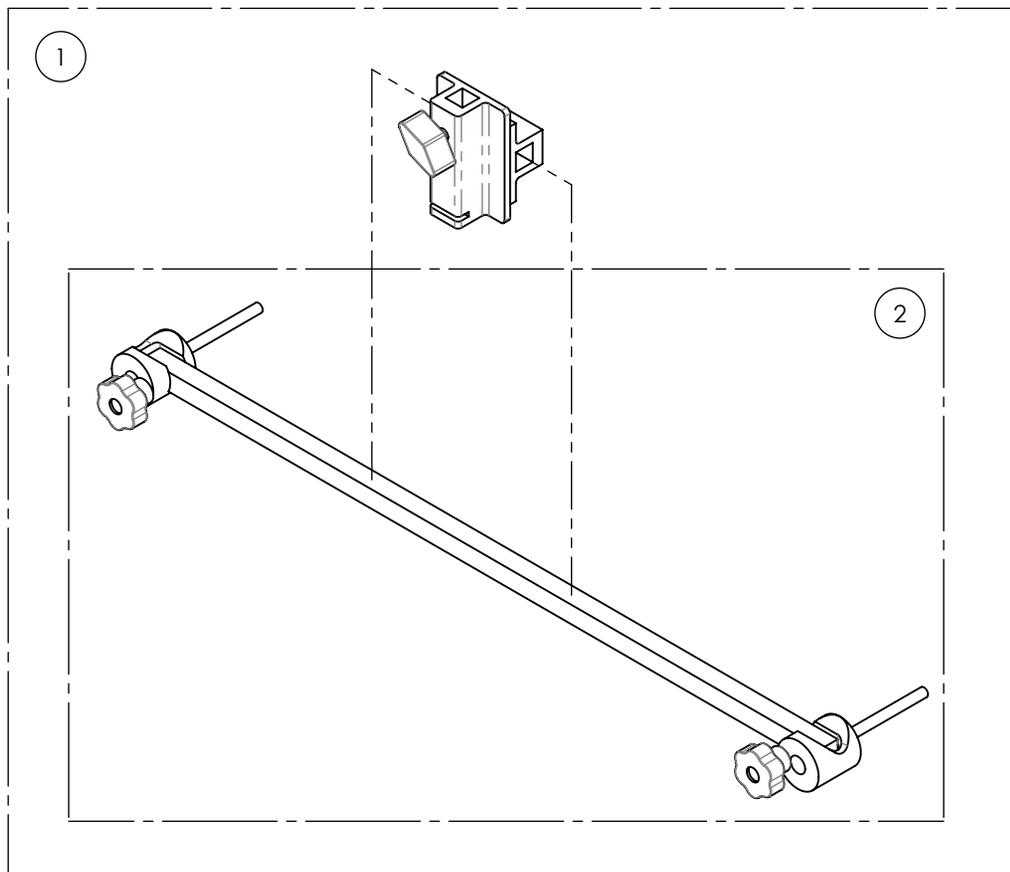


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001625A-00**  
**Tie Down - Rear, Std**

**9001625A-00**  
**Ancrage - Arrière, std**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION | 9001625 /QTE |
|----------|-------------|-------------|--------------|
| 1        | 0022004C-00 | ANCRAGE     | 1            |

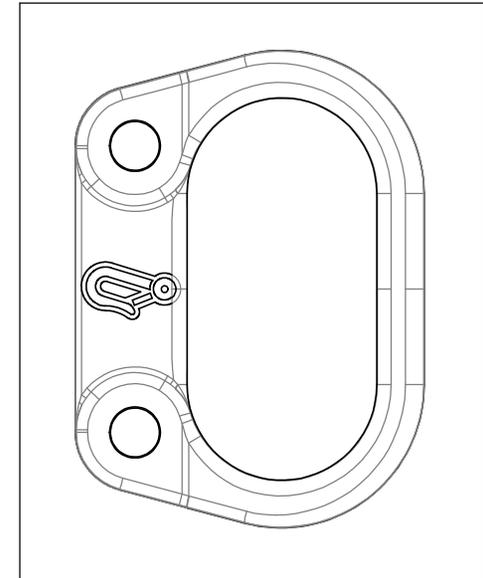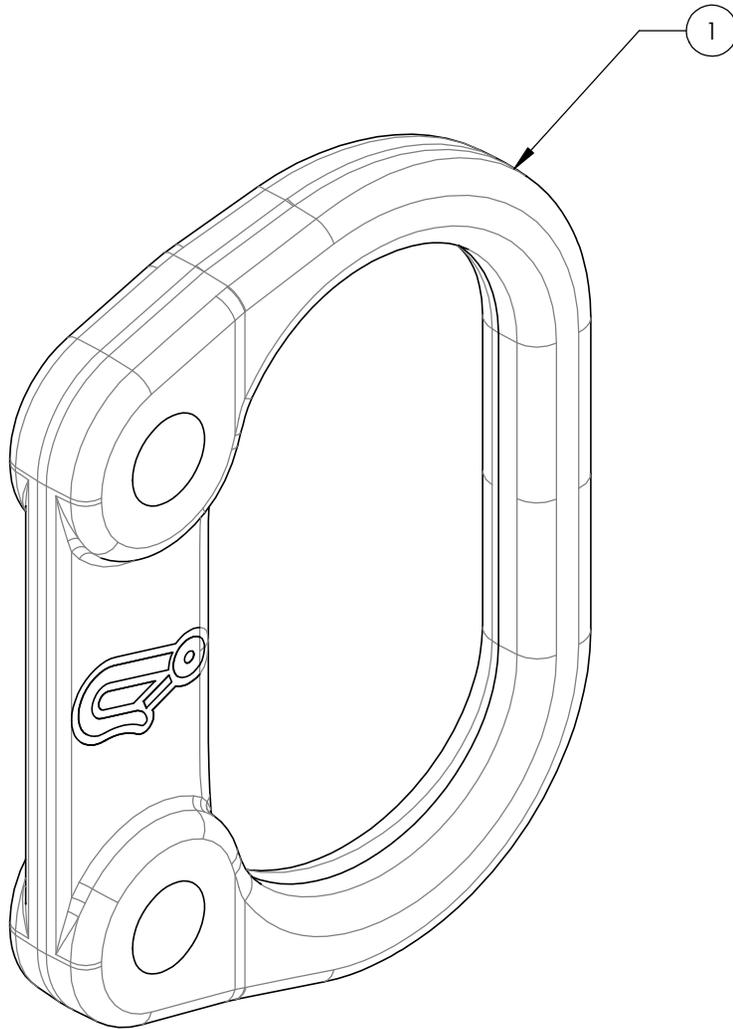

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9002875B-00**  
**MONTANT - CARBONE, DROIT, FIXE, 9po**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                        | QTÉ |
|----------|-------------|------------------------------------|-----|
| 1        | 0032118B-00 | DOSSIER CARBONE DROIT 9po FIXE (M) | 1   |
| 2        | 0099704A-00 | BOUCHON 1po (CARBONE)              | 1   |
| 3        | 0099653A-00 | RIVET FILETÉ M5x0.8 (3.3-5.7MM)    | 1   |

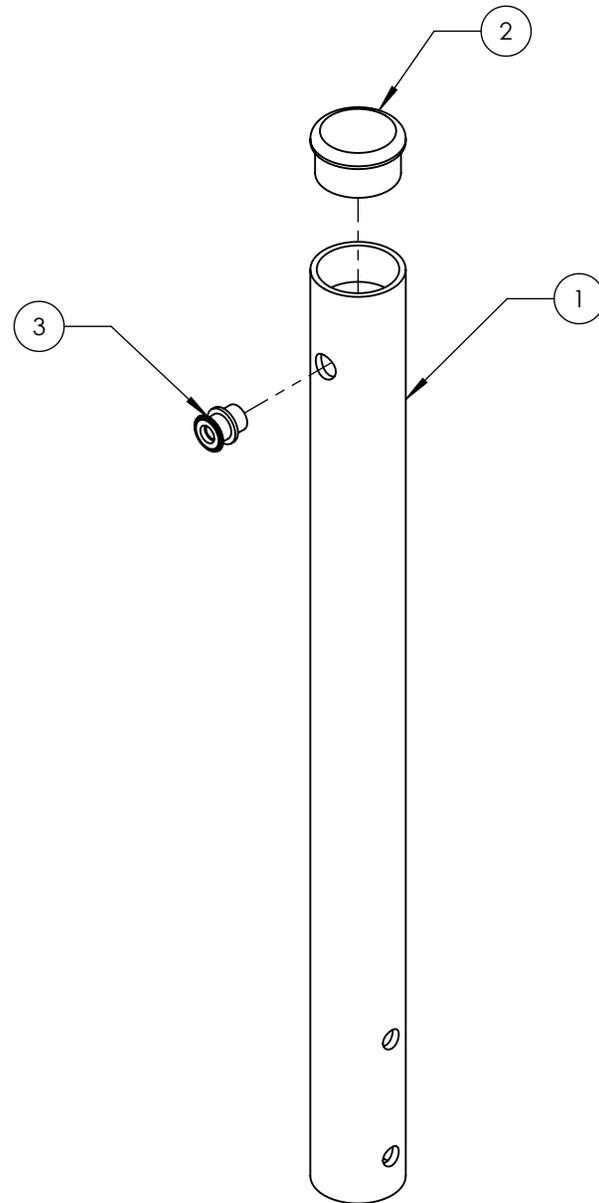


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9003095A-00**  
**Poignée de poussée - Rabattable**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                   | QTÉ | REPLACEMENT PIÈCES |
|----------|-------------|---|-----|--------------------|
| 1        | 0032542A-00 | POIGNÉE DE POUSSÉE RABATTABLE - ASSY          | 1   | -                  |
| 2        | 0032017B-00 | MANCHON POIGNÉE DE POUSSÉE                    | 1   | -                  |
| 3        | 0032514B-00 | DOWEL NUT POIGNÉE DE POUSSÉE - ASSEMBLAGE (M) | -   | 1                  |

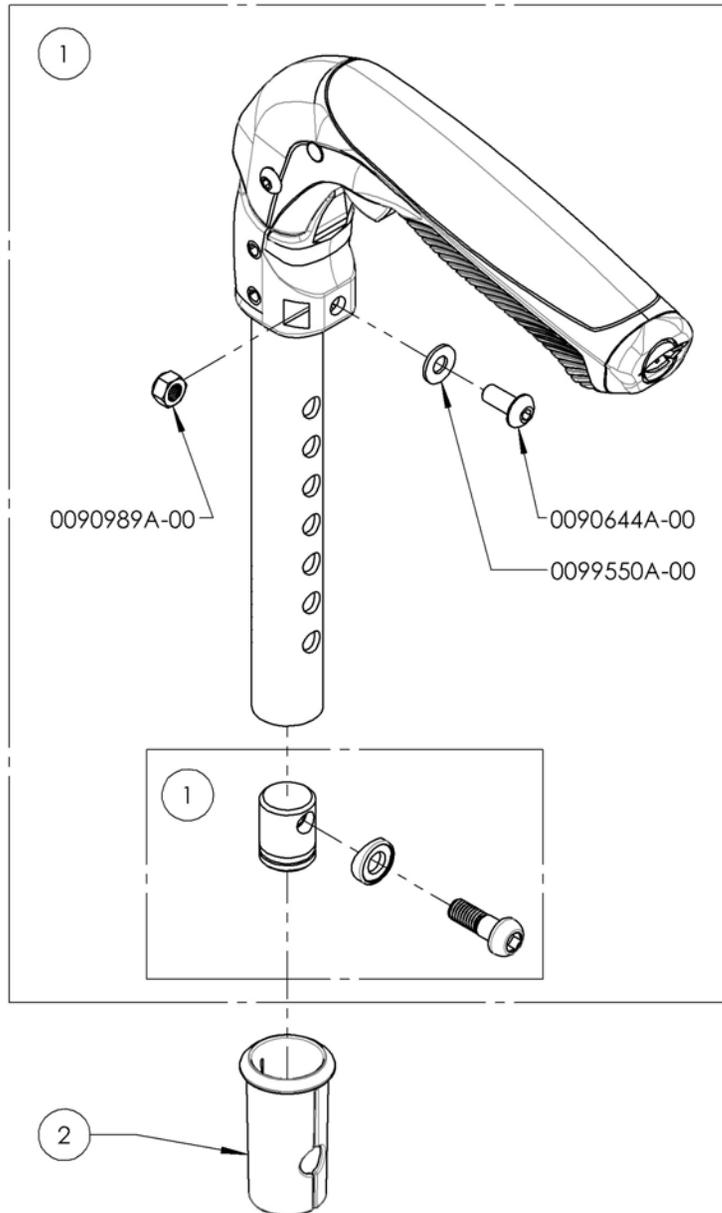


9003095A-00  
 Poignée de poussée - Rabattable

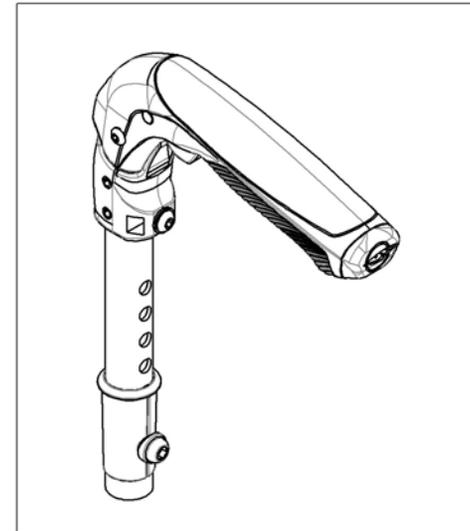


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9003298A 9003299A**  
**MONTANT DOSSIER - ALUMINIUM, DROIT AVEC POIGNÉE INTÉGRÉE**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                          | 9003298 | 9003299 |
|----------|-------------|--------------------------------------|---------|---------|
| 1        | 0032539A-00 | DOSSIER ALU DROIT IPH 9-15po - ASSY  | 1       | -       |
| 2        | 0032540A-00 | DOSSIER ALU DROIT IPH 15-21po - ASSY | -       | 1       |
| 3        | 0090647A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M5x0.8x18mm L        | 1       | 1       |

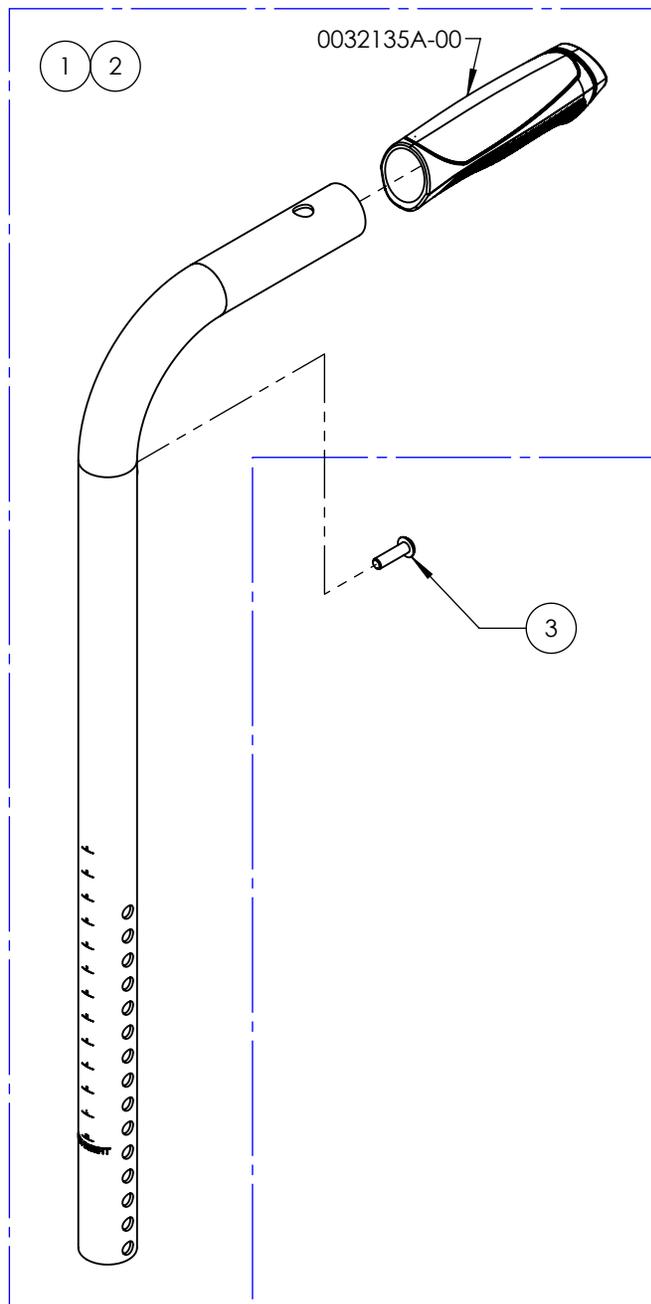

9003298A-00  
MONTANT - ALU, IPH, DROIT 9-15po

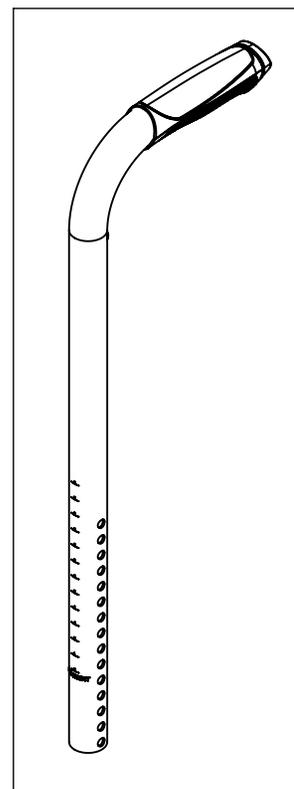



9003299A-00  
MONTANT - ALU, IPH, DROIT 15-21po

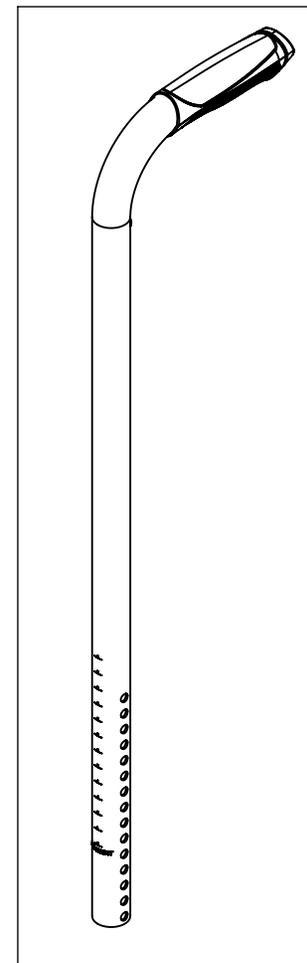

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9007565A-00**  
**POIGNÉE DE POUSSÉE HD - AJUSTABLE AVEC RONDELLE DE RETENUE**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                   | QTÉ | REPLACEMENT PIÈCES |
|----------|-------------|---|-----|--------------------|
| 1        | 0032541A-00 | POIGNÉE DE POUSSÉE HD & ROND RETENUE - ASSY   | 1   | -                  |
| 2        | 0032017B-00 | MANCHON POIGNÉE DE POUSSÉE                    | 1   | -                  |
| 3        | 0032514B-00 | DOWEL NUT POIGNÉE DE POUSSÉE - ASSEMBLAGE (M) | -   | 1                  |

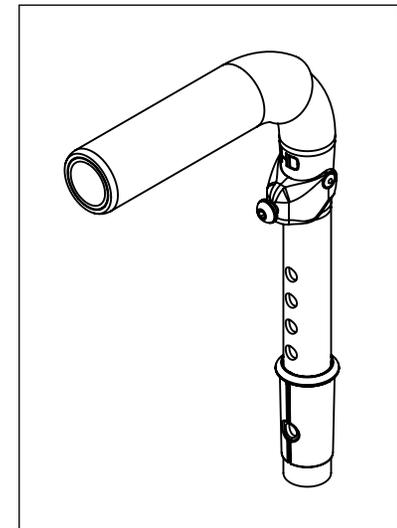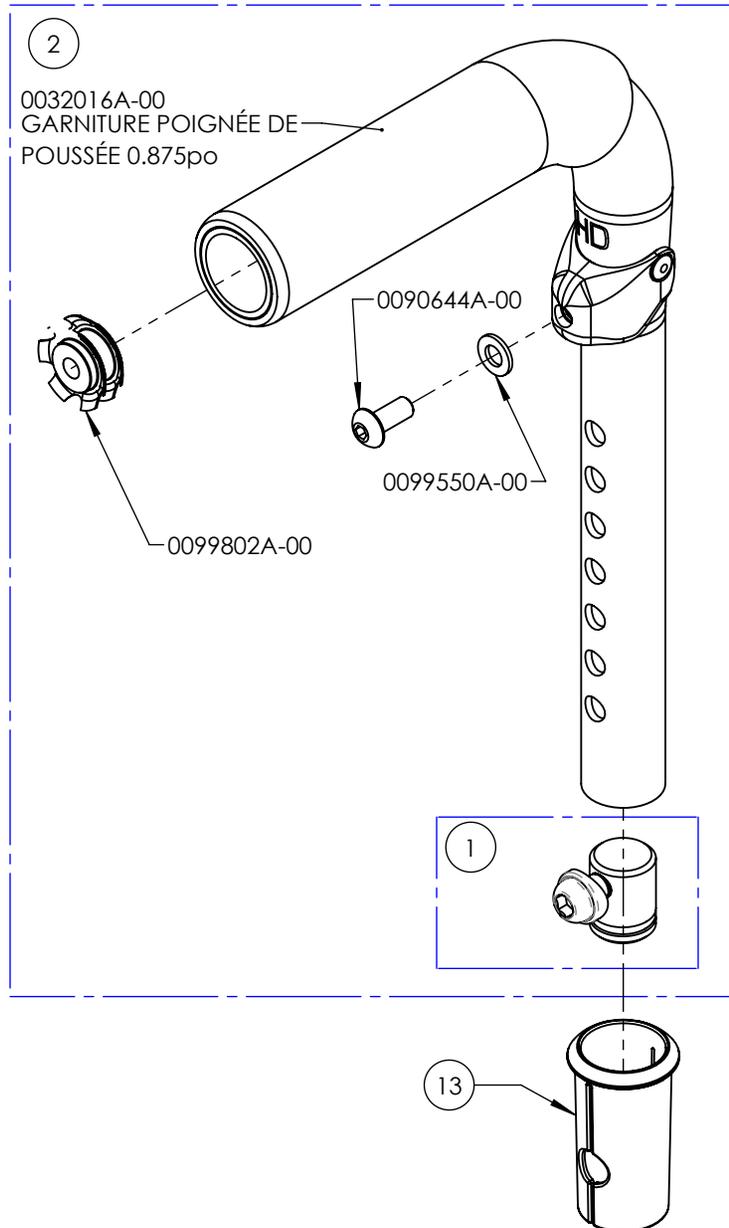


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9007610A 9007611A**  
**MONTANT - ALU, IPH, TC, DROIT**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                  | 9007610 | 9007611 |
|----------|-------------|--|---------|---------|
| 1        | 0032546A-00 | DOSSIER ALU DROIT IPH & ROND RETENUE 9-15po  | 1       | -       |
| 2        | 0032547A-00 | DOSSIER ALU DROIT IPH & ROND RETENUE 15-21po | -       | 1       |
| 3        | 0090647A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M5x0.8x18mm L                | 1       | 1       |

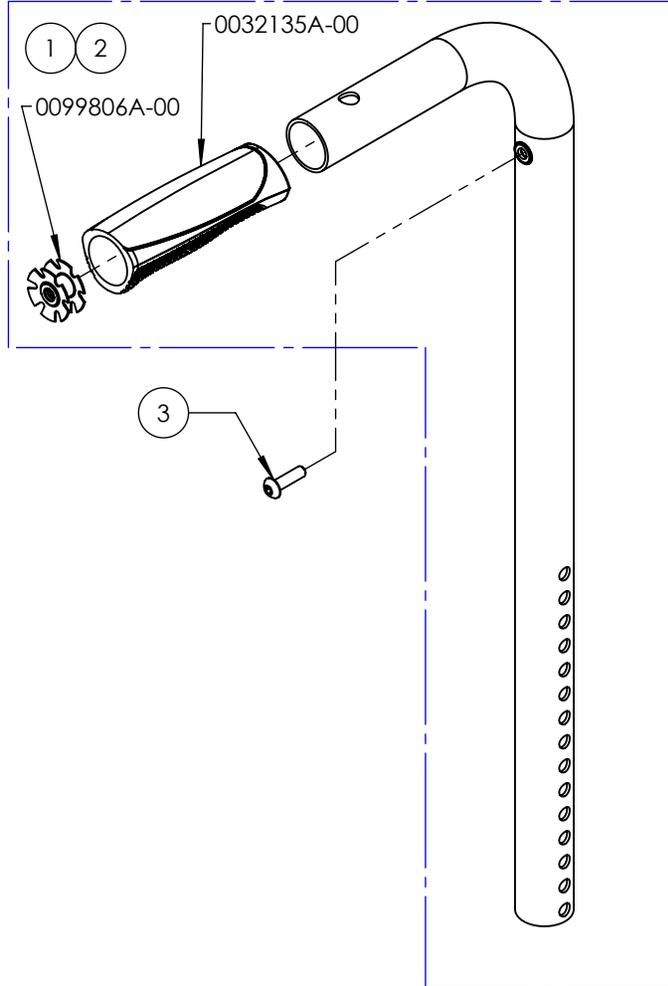

9007610A-00  
MONTANT - ALU, IPH, TC,  
DROIT, 9-15po

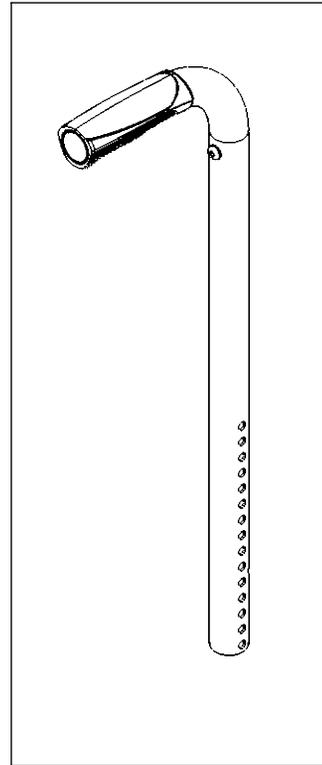



9007611A-00  
MONTANT - ALU, IPH, TC, DROIT,  
15-21po

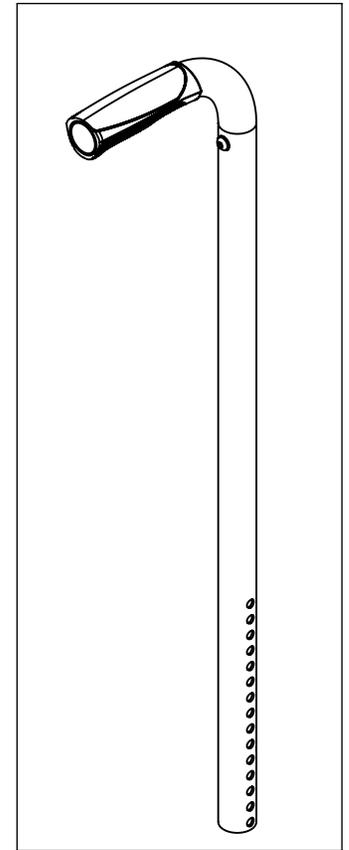

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9007612A-00**  
**MONTANT - ALU, IPH, TC, 8°@8po, 16, 18 OU 20po**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 1        | 0032500A-00 | DOSSIER ALU 8 DEG IPH 16, 18 & 20po - ASSY | 1   |
| 2        | 0090647A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M5x0.8x18mm L              | 1   |
| 3        | 0099802A-00 | RONDELLE RETENUE 1/4-20 (0.75/0.775po ID)  | 1   |

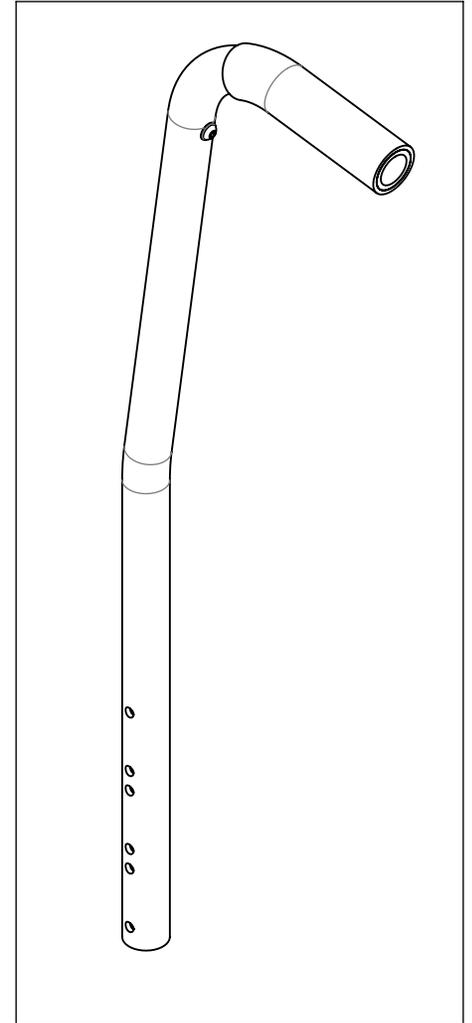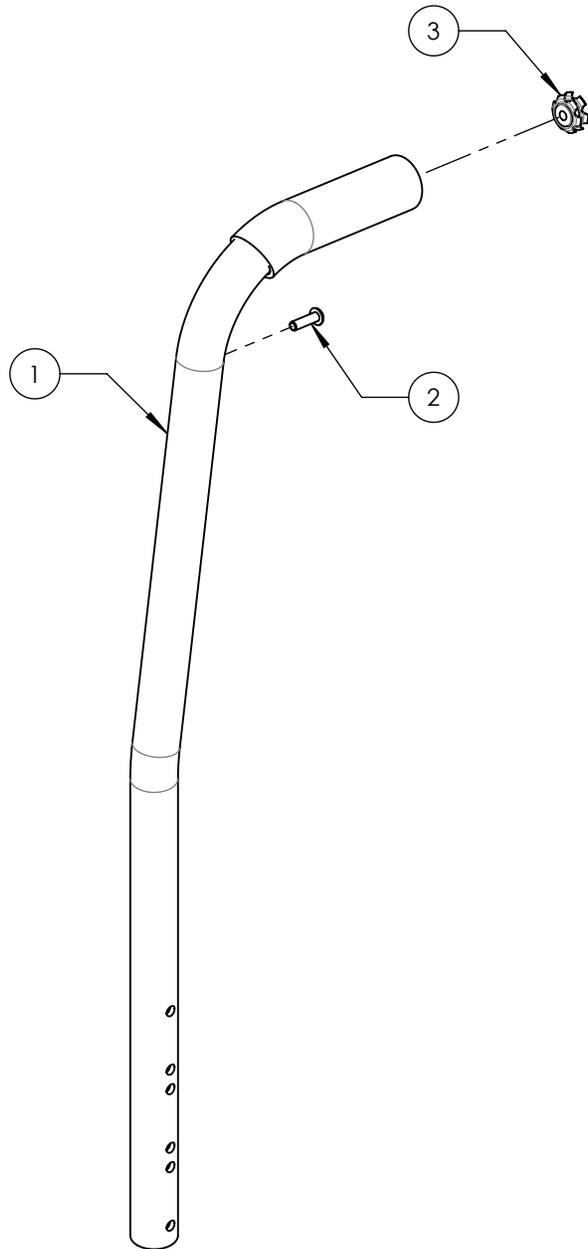

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES



**9007613A\_9007614A**  
**MONTANT DOSSIER - ALU, AJUST. EN ANGLE, 8° À 8 po + RONDELLE RETENUE**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                               | 9007613 | 9007614 |
|----------|-------------|---|---------|---------|
| 1        | 0032501A-00 | DOSSIER ALU 8 DEG AJUST IPH 16po - ASSY   | 1       | -       |
| 2        | 0032502A-00 | DOSSIER ALU 8 DEG AJUST IPH 20po - ASSY   | -       | 1       |
| 3        | 0032037B-00 | DOSSIER AJUSTABLE BAS (M)                 | 1       | 1       |
| 4        | 0090663A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M6x1x25mm L               | 2       | 2       |
| 5        | 0090647A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M5x0.8x18mm L             | 1       | 1       |
| 6        | 0099802A-00 | RONDELLE RETENUE 1/4-20 (0.75/0.775po ID) | 1       | 1       |

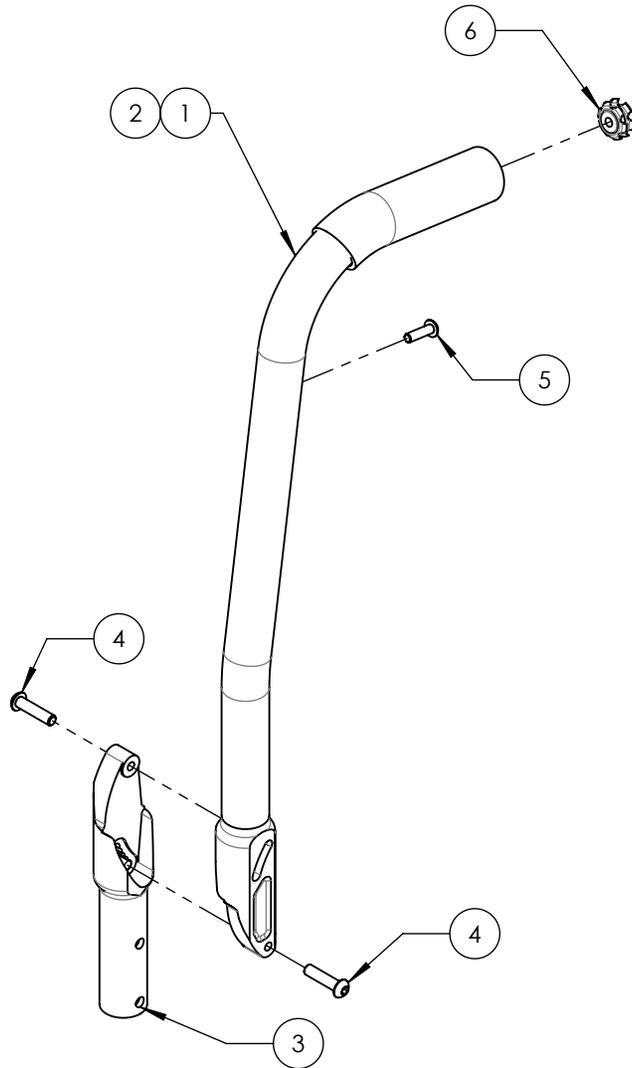

9007614A-00  
 MONTANT - ALU, IPH, TC,  
 ANGLE AJUST, 8°@8po, 20po



9007613A-00  
 MONTANT - ALU, IPH, TC,  
 ANGLE AJUST, 8°@8po, 16po

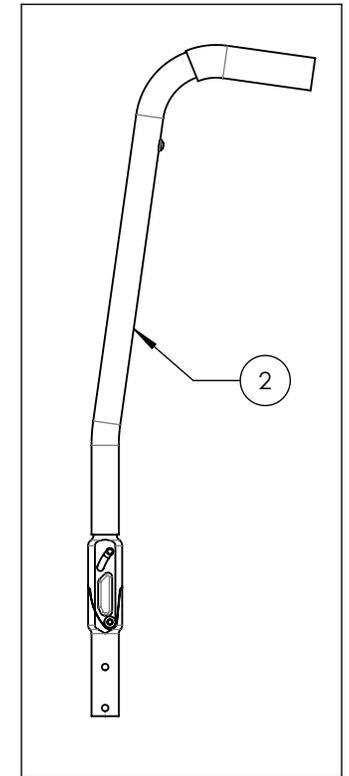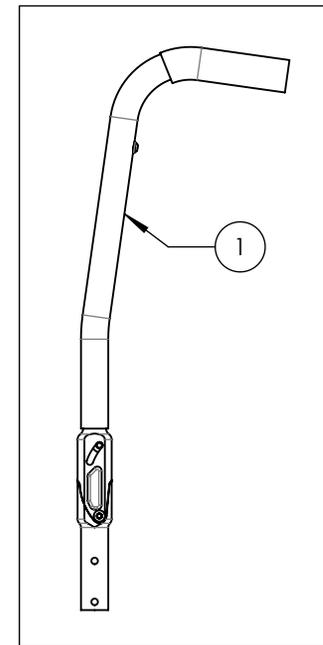

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9007624A-00**  
**QUINCAILLERIE - POUR APPUI-BRAS L AVEC ANCRAGE**



| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                             | QTÉ |
|----------|-------------|---|-----|
| 1        | 0090669A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M6x1x55mm L, 24mm FILET | 2   |
| 2        | 0099512A-00 | ÉCROU AUTOBLOQUANT M6x1                 | 2   |
| 3        | 0099562A-00 | RONDELLE 1/4po                          | 2   |

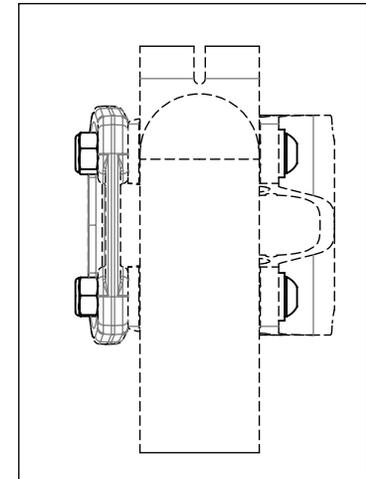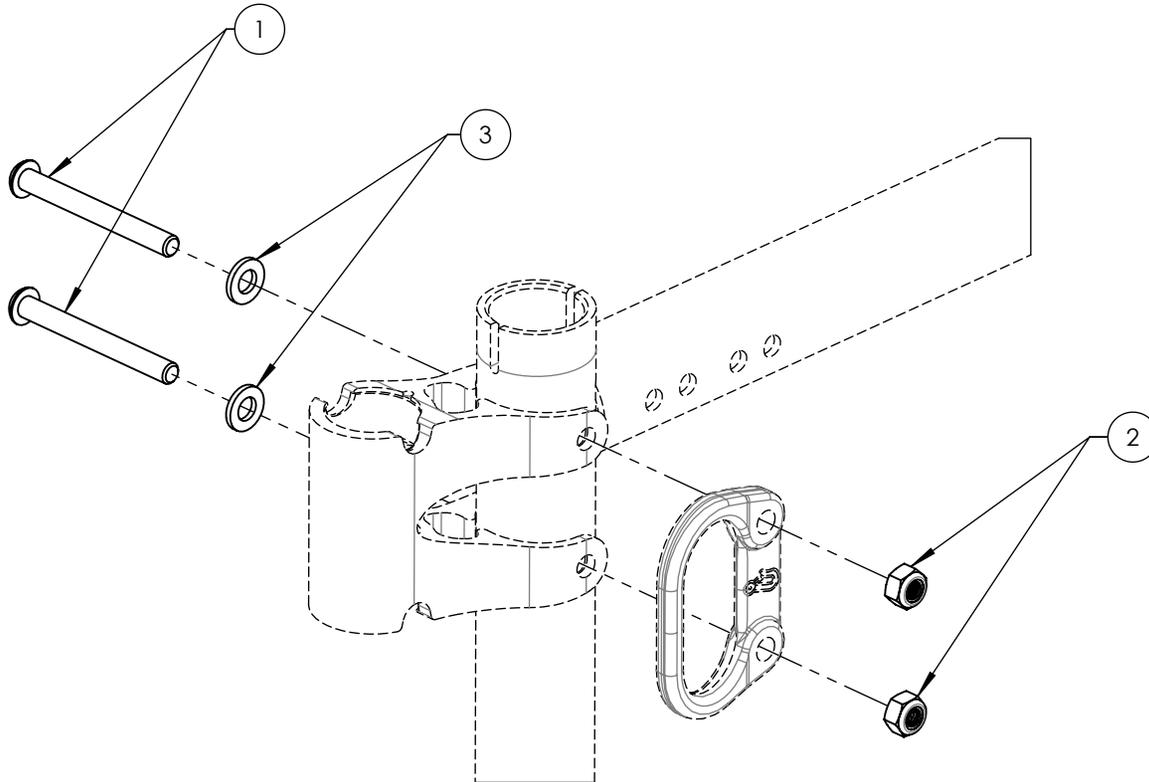

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9007625A-00**  
**QUINCAILLERIE - POUR APPUI-BRAS L**



| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                             | QTÉ |
|----------|-------------|---|-----|
| 1        | 0090667A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M6x1x45mm L, 24mm FILET | 2   |
| 2        | 0099512A-00 | ÉCROU AUTOBLOQUANT M6x1                 | 2   |

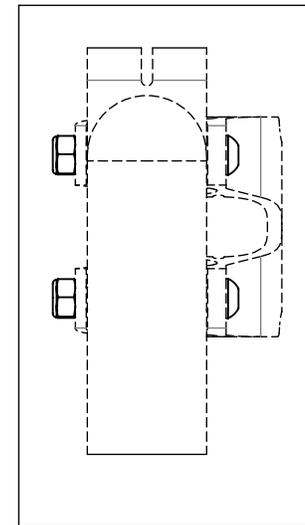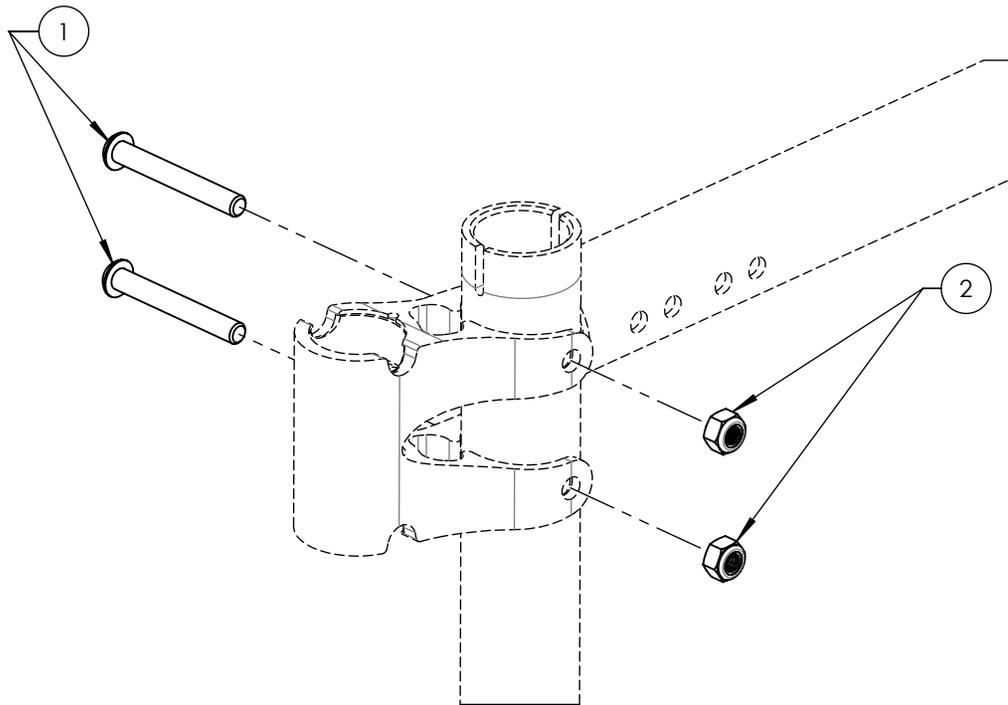

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9007626A-00**  
**QUINCAILLERIE - POUR AJUST PROFONDEUR AVEC ANCRAGE**



| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                  | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 1        | 0099560A-00 | RONDELLE 1/4po, 17/64 ID, 1/2 OD, .032 ÉPAIS | 4   |
| 2        | 0099512A-00 | ÉCROU AUTOBLOQUANT M6x1                      | 2   |
| 3        | 0090669A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M6x1x55mm L, 24mm FILET      | 2   |

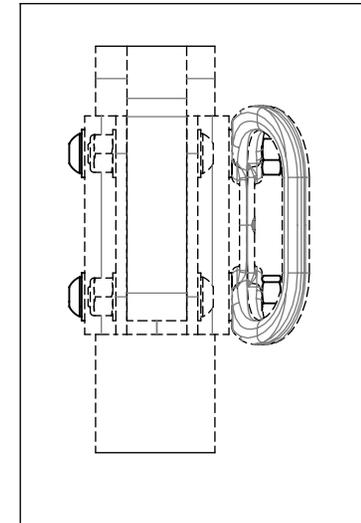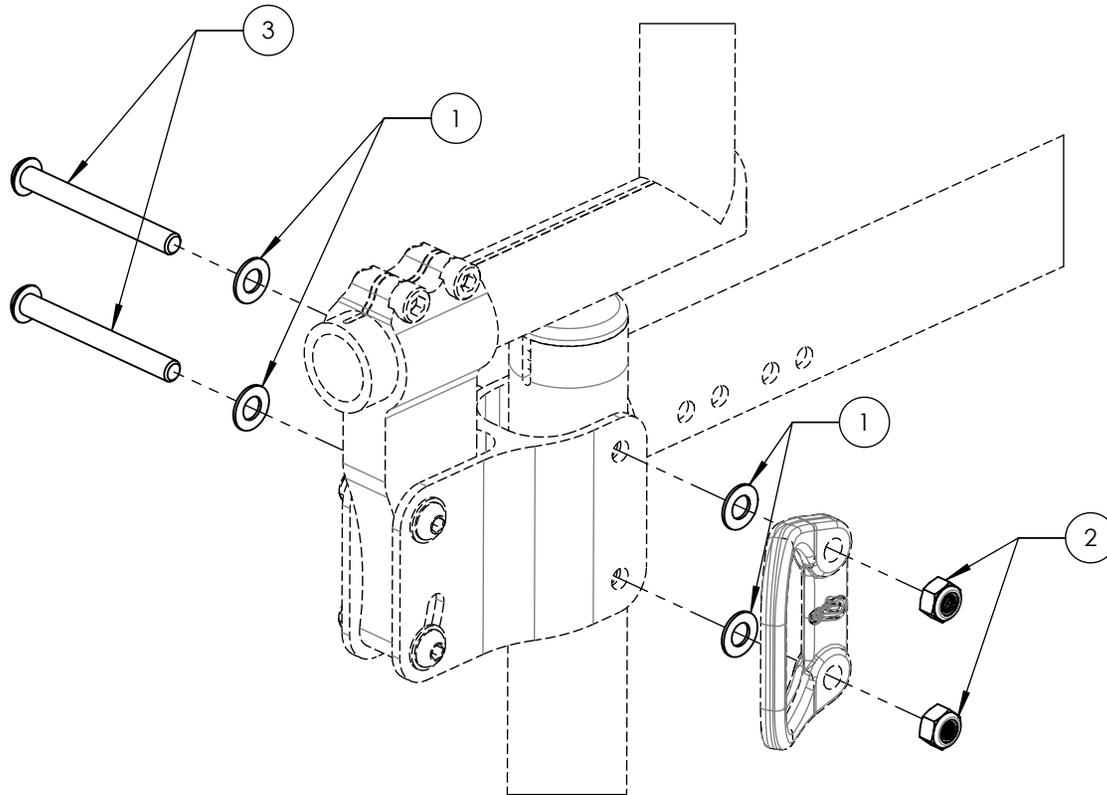

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9007627A-00**  
**QUINCAILLERIE - POUR AJUST PROFONDEUR**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                  | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 1        | 0099560A-00 | RONDELLE 1/4po, 17/64 ID, 1/2 OD, .032 ÉPAIS | 4   |
| 2        | 0099512A-00 | ÉCROU AUTOBLOQUANT M6x1                      | 2   |
| 3        | 0090667A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M6x1x45mm L, 24mm FILET      | 2   |

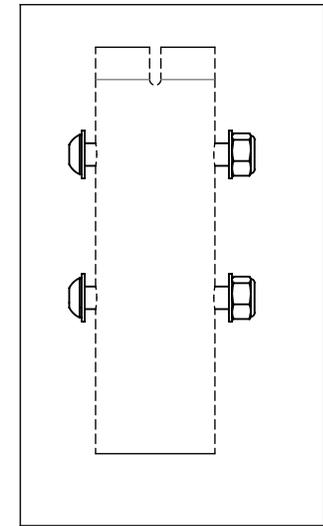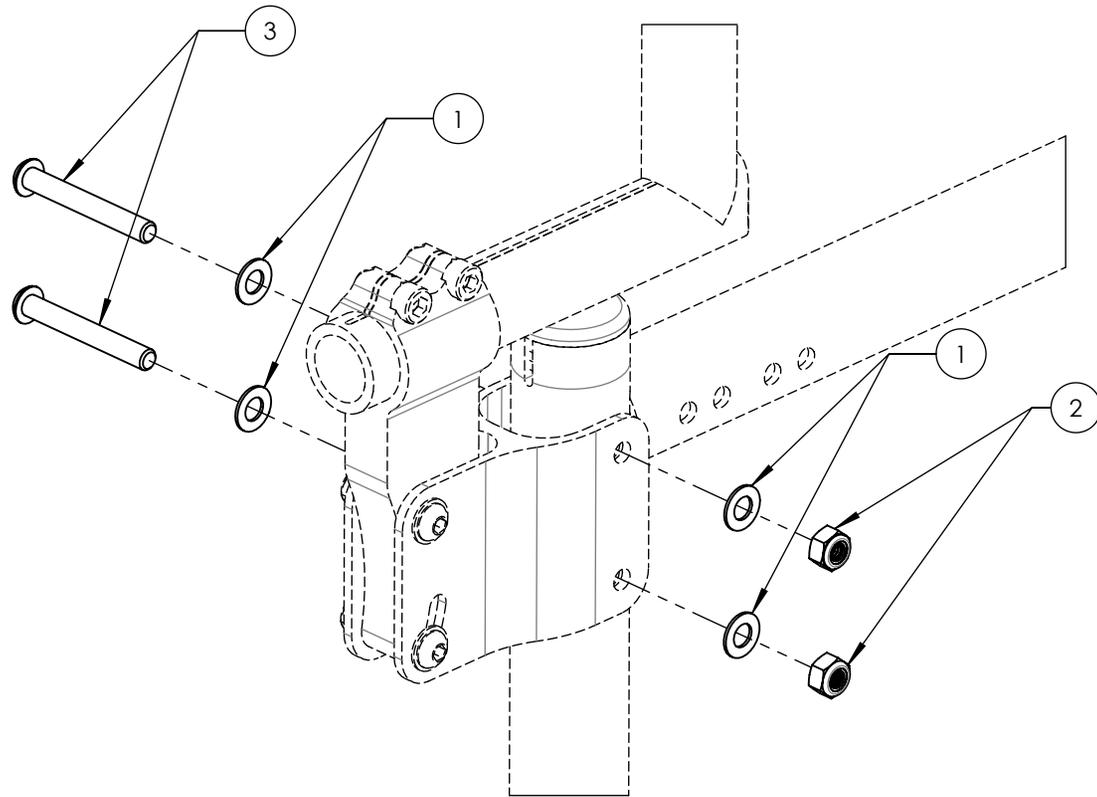

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue de montants de dossier**  
**Montants de dossier aluminium**









| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                 | QTÉ |
|----------|-------------|---|-----|
| 1        | 9001264A-00 | MONTANT - ALU, DROIT, 9-12PO                | 1   |
| 2        | 9001265A-00 | MONTANT - ALU, DROIT, 12-15PO               | 1   |
| 3        | 9001266A-00 | MONTANT - ALU, DROIT, 15-18PO               | 1   |
| 4        | 9001267A-00 | MONTANT - ALU, DROIT, 18-21PO               | 1   |
| 5        | 9001268A-00 | MONTANT - ALU, 8°@8PO, 13½-15PO             | 1   |
| 6        | 9001269A-00 | MONTANT - ALU, 8°@8PO, 15-18PO              | 1   |
| 7        | 9001270A-00 | MONTANT - ALU, 8°@8PO, 18-21PO              | 1   |
| 8        | 9001271A-00 | MONTANT - ALU, ANGLE AJUST, DROIT, 15-18PO  | 1   |
| 9        | 9001272A-00 | MONTANT - ALU, ANGLE AJUST, DROIT, 18-21PO  | 1   |
| 10       | 9001273A-00 | MONTANT - ALU, ANGLE AJUST, 8°@8PO, 15-18PO | 1   |
| 11       | 9001274A-00 | MONTANT - ALU, ANGLE AJUST, 8°@8PO, 18-21PO | 1   |

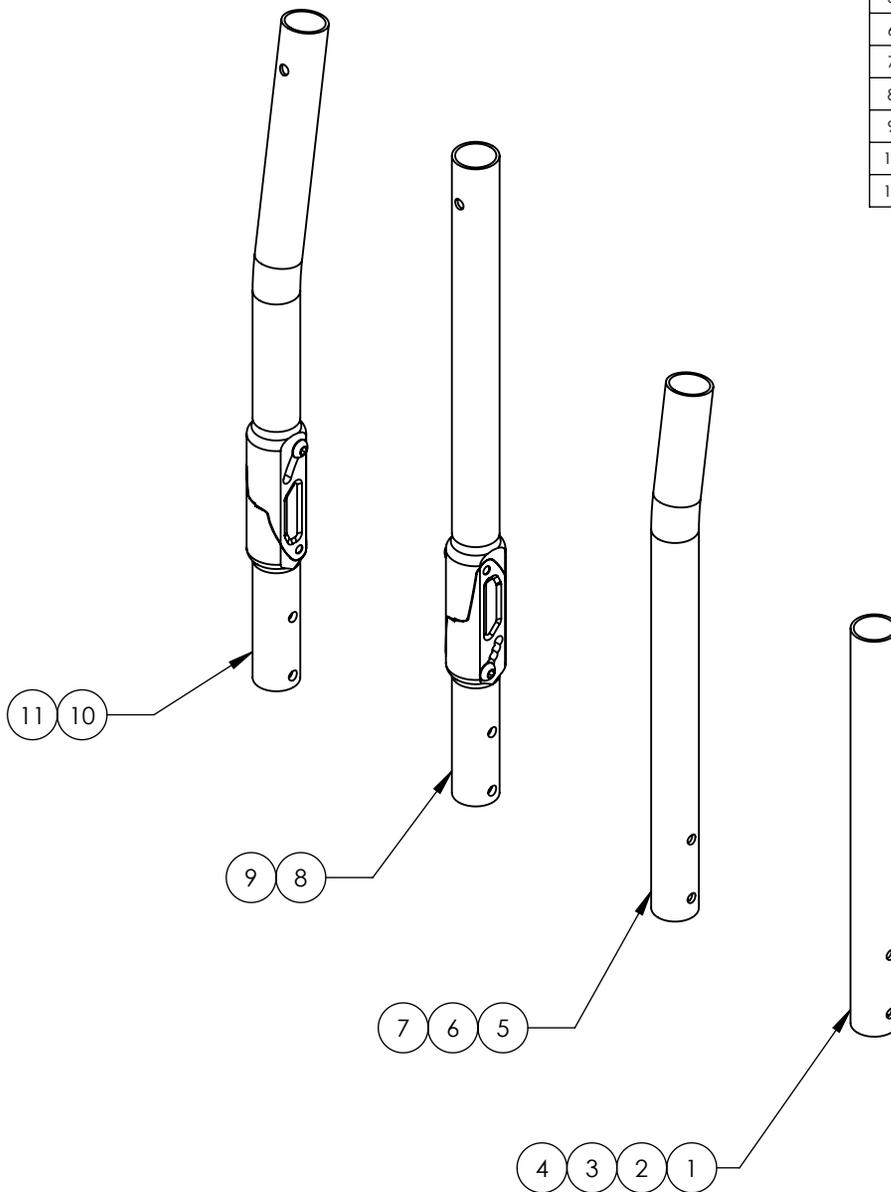

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue de montants de dossier**  
**Quincaillerie de montant de dossier**





| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                    | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 1        | 9001233A-00 | QUINCAILLERIE - POUR APPUI-BRAS U AVEC ANCRAGE | 1   |
| 2        | 9001175A-00 | QUINCAILLERIE - POUR APPUI-BRAS U              | 1   |
| 3        | 9001173A-00 | QUINCAILLERIE - POUR ANCRAGE                   | 1   |
| 4        | 9001004A-00 | QUINCAILLERIE - SANS ANCRAGE                   | 1   |
| 5        | 9001625A-00 | Ancrage - Arrière, std                         | 1   |

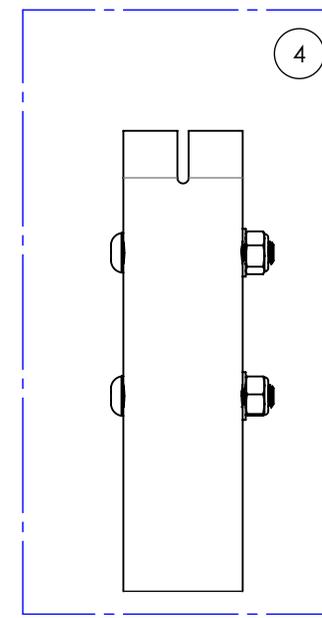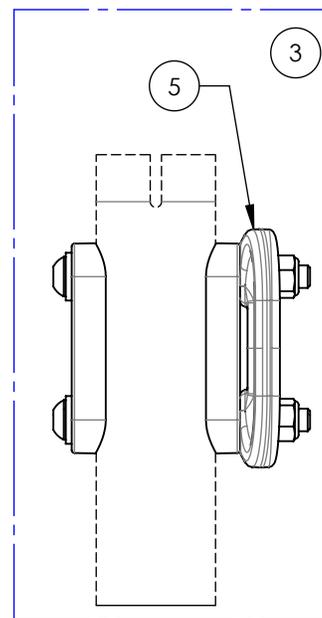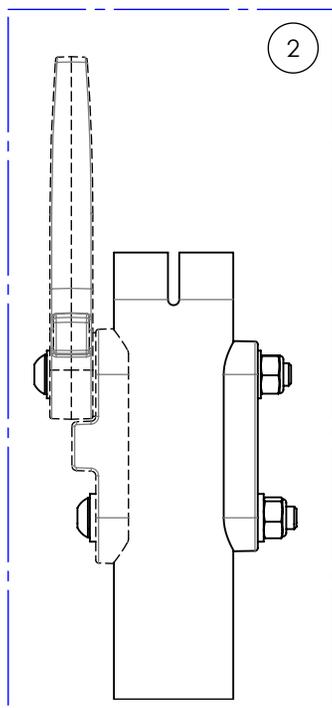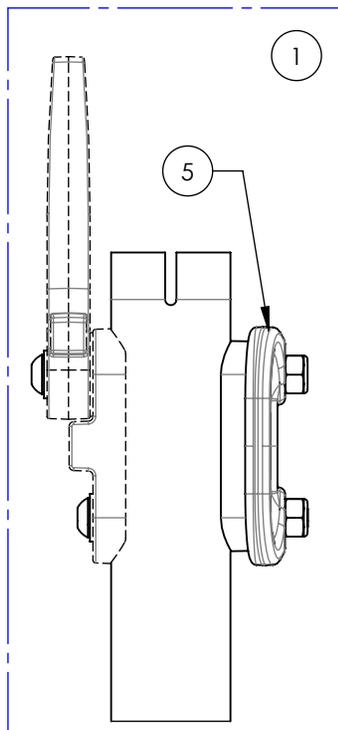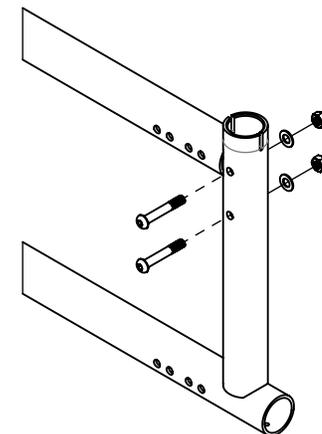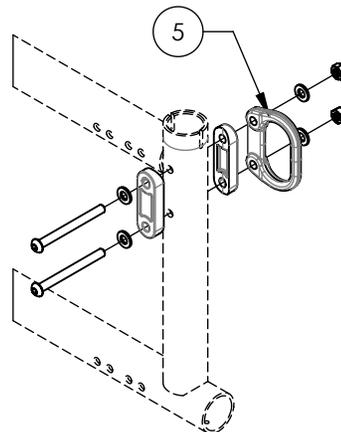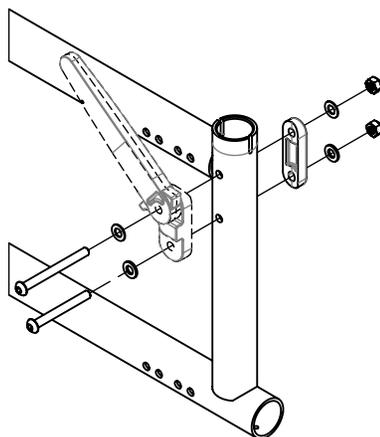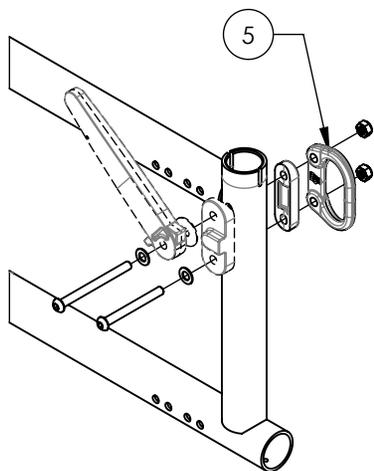

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue de montants de dossier**  
**Quincaillerie de montant de dossier (Dossier ajust. en profondeur)**





| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION  | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 1        | 9007626A-00 | QUINCAILLERIE - POUR AJUST PROFONDEUR AVEC ANCRAGE | 1   |
| 2        | 9007627A-00 | QUINCAILLERIE - POUR AJUST PROFONDEUR              | 1   |
| 3        | 9001626A-00 | ANCRAGE - AVANT, STD, INCLINÉ                      | 1   |

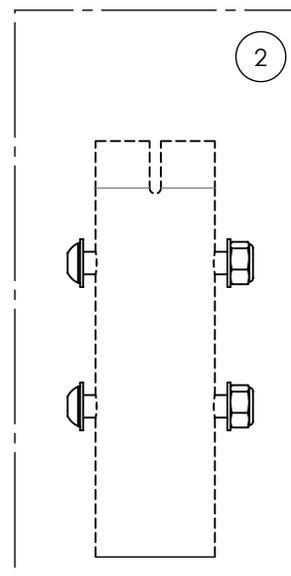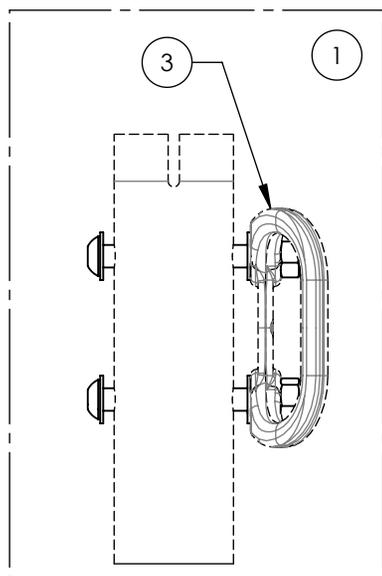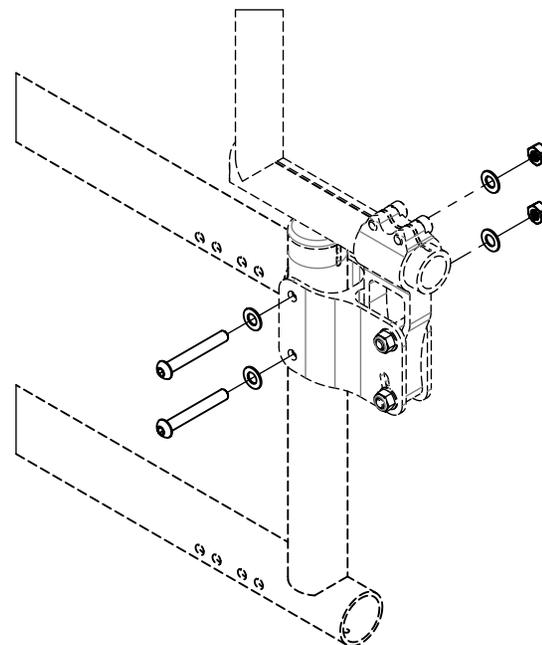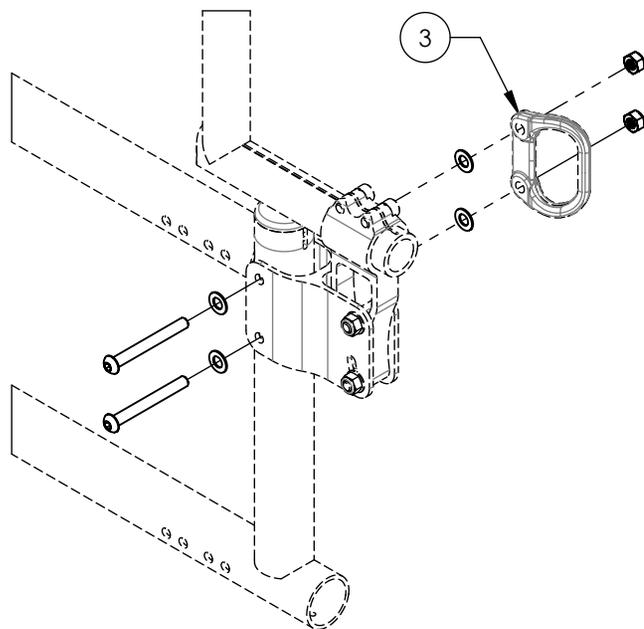

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue de montants de dossier**  
**Quincaillerie de montant de dossier (Appui-bras en L)**




| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                    | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 1        | 9007624A-00 | QUINCAILLERIE - POUR APPUI-BRAS L AVEC ANCRAGE | 1   |
| 2        | 9007625A-00 | QUINCAILLERIE - POUR APPUI-BRAS L              | 1   |
| 3        | 9001625A-00 | ANCRAGE - ARRIÈRE, STD                         | 1   |

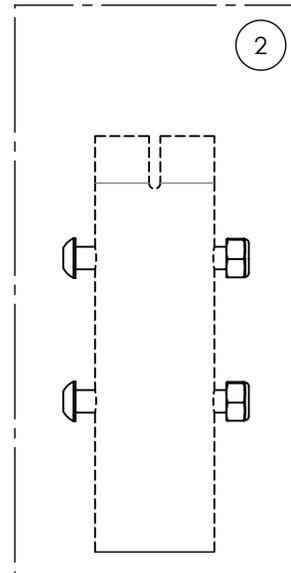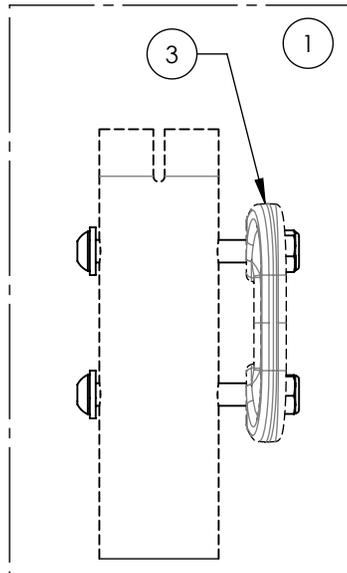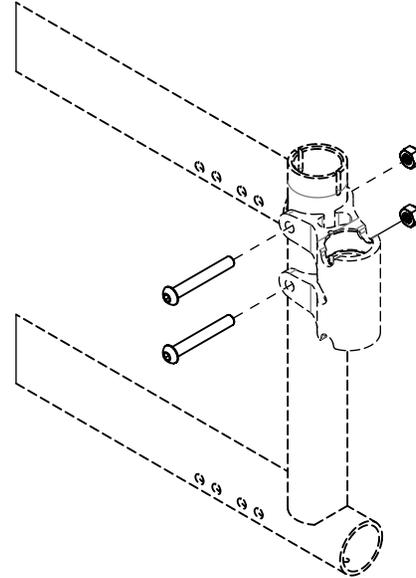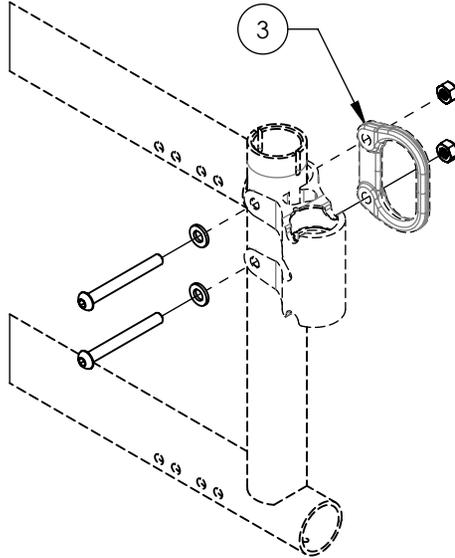

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES



**\*Les poignées de poussée HD ou poignées de poussée intégrées sont nécessaires pour installer les barres de tensions (#9001592 & #9001593)  
Veillez vous référer au catalogue des poignées de poussée pour appuis-tête.**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                    | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 1        | 9001592A-00 | BARRE DE TENSION - MONTURE ARTICULÉE & ANCRAGE | 1   |
| 2        | 9001593A-00 | BARRE DE TENSION - ANCRAGE APPUI-TÊTE          | 1   |
| 3        | 9001589A-00 | COUSSIN APPUI-TÊTE - PETIT, 3½X6PO             | 1   |
| 4        | 9001590A-00 | COUSSIN APPUI-TÊTE - MOYEN, 4½X7PO             | 1   |
| 5        | 9001591A-00 | COUSSIN APPUI-TÊTE - GRAND, 5½X8PO             | 1   |

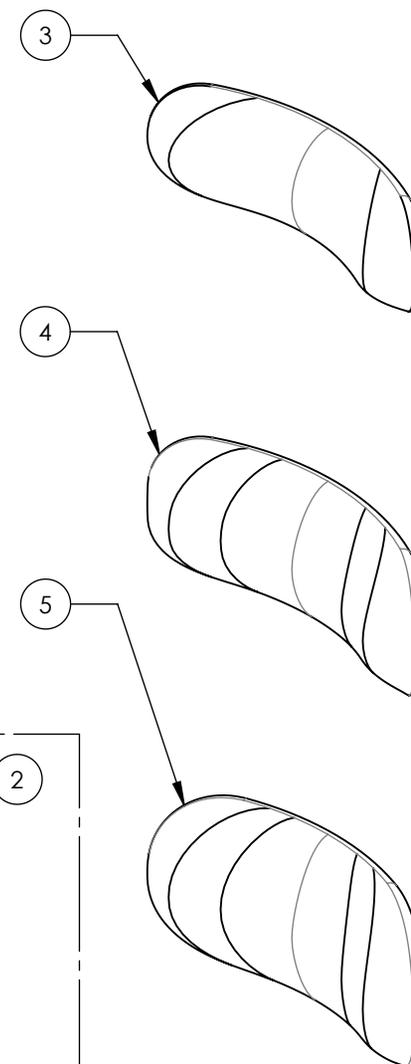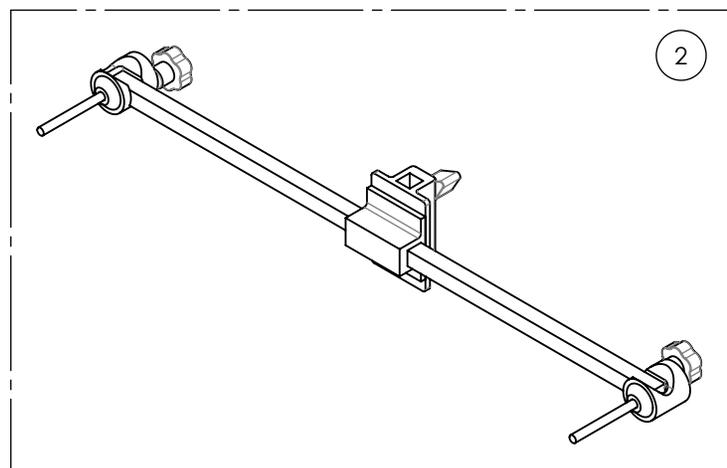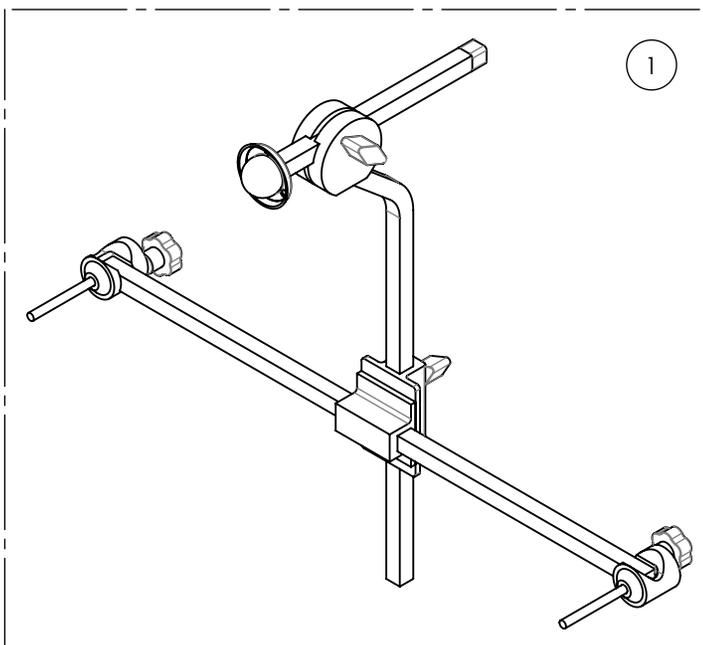

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue de montants de dossier**  
**Poignées de poussée pour appuis-tête**

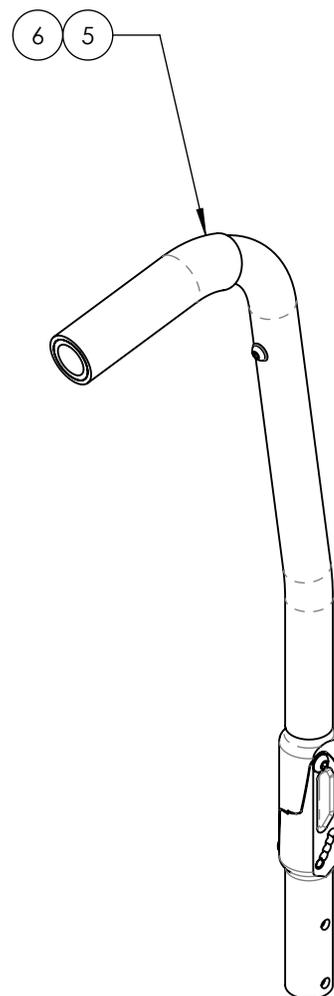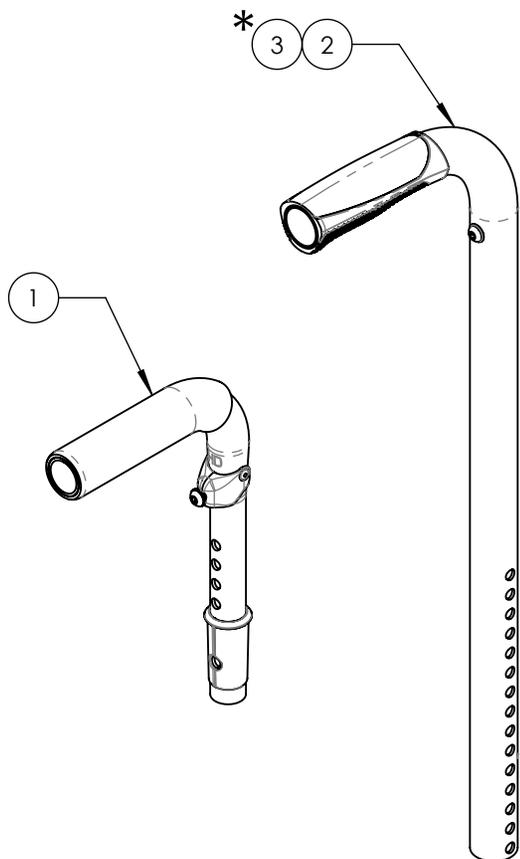




\* NON DISPONIBLE POUR FAUTEUILS VELOCE

| No. ITEM | No. PIÈCE    | DESCRIPTION  | QTÉ |
|----------|--------------|--|-----|
| 1        | 9007565A-00  | POIGNÉE DE POUSSÉE HD - AJUSTABLE AVEC RONDELLE DE RETENUE | 1   |
| 2        | 9007610A-00* | MONTANT - ALU, IPH, TC, DROIT, 9-15po                      | 1   |
| 3        | 9007611A-00* | MONTANT - ALU, IPH, TC, DROIT, 15-21po                     | 1   |
| 4        | 9007612A-00* | MONTANT - ALU, IPH, TC, 8°@8po, 16, 18 OU 20po             | 1   |
| 5        | 9007613A-00  | MONTANT - ALU, IPH, TC, ANGLE AJUST, 8°@8po, 16po          | 1   |
| 6        | 9007614A-00  | MONTANT - ALU, IPH, TC, ANGLE AJUST, 8°@8po, 20po          | 1   |

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue de montants de dossier**  
**Poignées de poussée & extension droite**


| No. ITEM | No. PIÈCE | DESCRIPTION  | QTÉ |
|----------|-----------|--|-----|
| 1        | 9001286   | Poignée de poussée - Extension droite ajustable sans poignée | 1   |
| 2        | 9001285   | Poignée de poussée - Ajustable                               | 1   |
| 3        | 9002915   | Poignée de poussée HD - Ajustable                            | 1   |
| 4        | 9003095   | Poignée de poussée - Rabattable, ajustable                   | 1   |

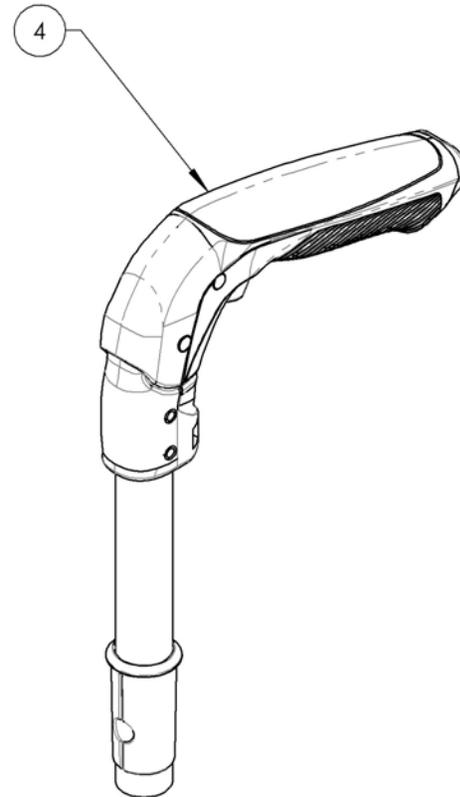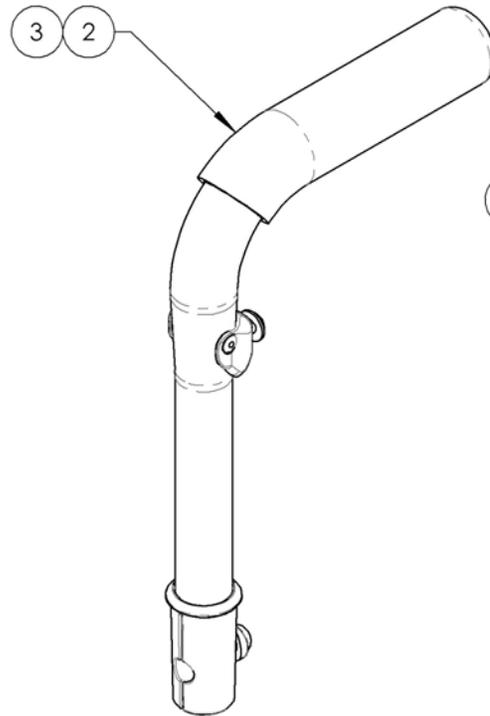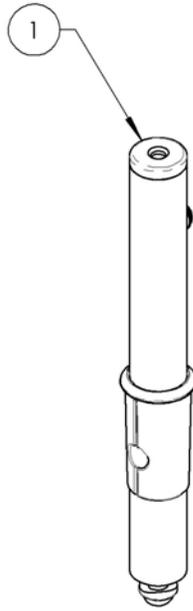


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue de montants de dossier**  
**Barre de tension de dossier pliante Newton**

UTILISER LE MANCHON #0032001A-00 SI LA BARRE DE TENSION NEWTON (#0060704C À #0060714C) SERA INSTALLÉE AVEC LES MONTANTS DE DOSSIER ALUMINIUM DROIT AVEC POIGNÉE INTÉGRÉE (#9003298A OU #9003299A)

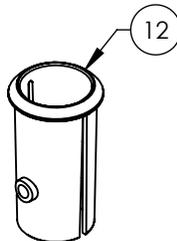

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                 | QTÉ |
|----------|-------------|---|-----|
| 1        | 0060704C-00 | BARRE DE TENSION PLIABLE NEWTON 12po - ASSY | 1   |
| 2        | 0060705C-00 | BARRE DE TENSION PLIABLE NEWTON 13po - ASSY | 1   |
| 3        | 0060706C-00 | BARRE DE TENSION PLIABLE NEWTON 14po - ASSY | 1   |
| 4        | 0060707C-00 | BARRE DE TENSION PLIABLE NEWTON 15po - ASSY | 1   |
| 5        | 0060708C-00 | BARRE DE TENSION PLIABLE NEWTON 16po - ASSY | 1   |
| 6        | 0060709C-00 | BARRE DE TENSION PLIABLE NEWTON 17po - ASSY | 1   |
| 7        | 0060710C-00 | BARRE DE TENSION PLIABLE NEWTON 18po - ASSY | 1   |
| 8        | 0060711C-00 | BARRE DE TENSION PLIABLE NEWTON 19po - ASSY | 1   |
| 9        | 0060712C-00 | BARRE DE TENSION PLIABLE NEWTON 20po - ASSY | 1   |
| 10       | 0060713C-00 | BARRE DE TENSION PLIABLE NEWTON 21po - ASSY | 1   |
| 11       | 0060714C-00 | BARRE DE TENSION PLIABLE NEWTON 22po - ASSY | 1   |
| 12       | 0032001A-00 | MANCHON POIGNÉE DE POUSSETTE                | 1   |

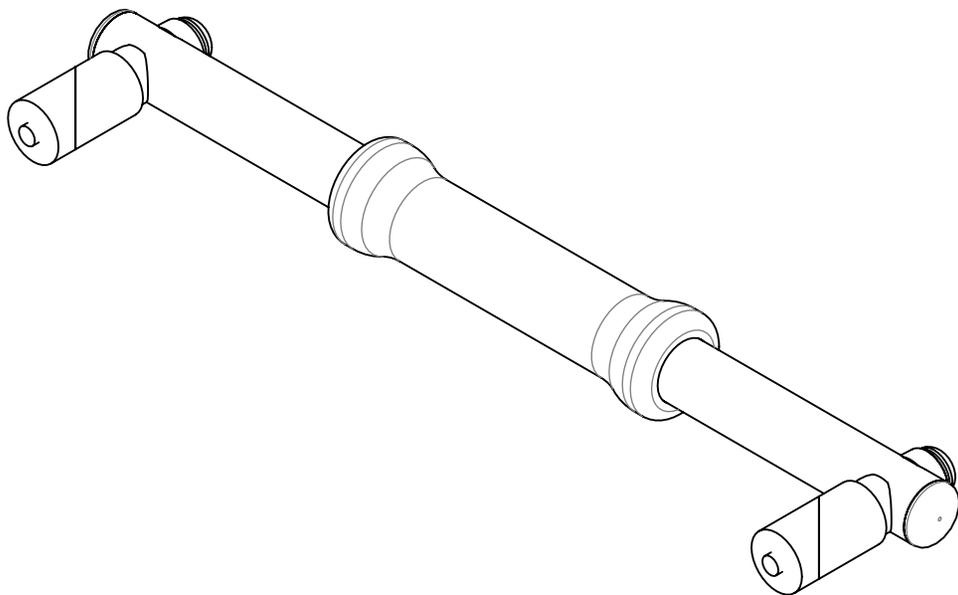

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


## AVERTISSEMENT important sur les poignées de poussette






Les poignées de poussette n'ont pas été conçues pour soulever ou tirer le poids d'un utilisateur dans son fauteuil roulant. Cet accessoire est conçu pour pousser et guider l'utilisateur dans son fauteuil.

Soulever ou tirer le poids d'un utilisateur dans son fauteuil roulant peut résulter à un bris des poignées de poussée et causer des blessures graves **(SVP VOUS RÉFÉRER AU MANUEL D'UTILISATEUR)**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                  | QTÉ |
|----------|-------------|------------------------------|-----|
| 1        | 0051523A-00 | POIGNÉE POUSETTE 10po - ASSY | 1   |
| 2        | 0051524A-00 | POIGNÉE POUSETTE 11po - ASSY | 1   |
| 3        | 0051525A-00 | POIGNÉE POUSETTE 12po - ASSY | 1   |
| 4        | 0051526A-00 | POIGNÉE POUSETTE 13po - ASSY | 1   |
| 5        | 0051527A-00 | POIGNÉE POUSETTE 14po - ASSY | 1   |
| 6        | 0051528A-00 | POIGNÉE POUSETTE 15po - ASSY | 1   |
| 7        | 0051529A-00 | POIGNÉE POUSETTE 16po - ASSY | 1   |
| 8        | 0051530A-00 | POIGNÉE POUSETTE 17po - ASSY | 1   |
| 9        | 0051531A-00 | POIGNÉE POUSETTE 18po - ASSY | 1   |
| 10       | 0051532A-00 | POIGNÉE POUSETTE 19po - ASSY | 1   |
| 11       | 0051533A-00 | POIGNÉE POUSETTE 20po - ASSY | 1   |
| 12       | 0032001A-00 | MANCHON POIGNÉE DE POUSETTE  | 1   |
| 13       | 9002915A-00 | POIGNÉE DE POUSSÉE - HD      | 2   |

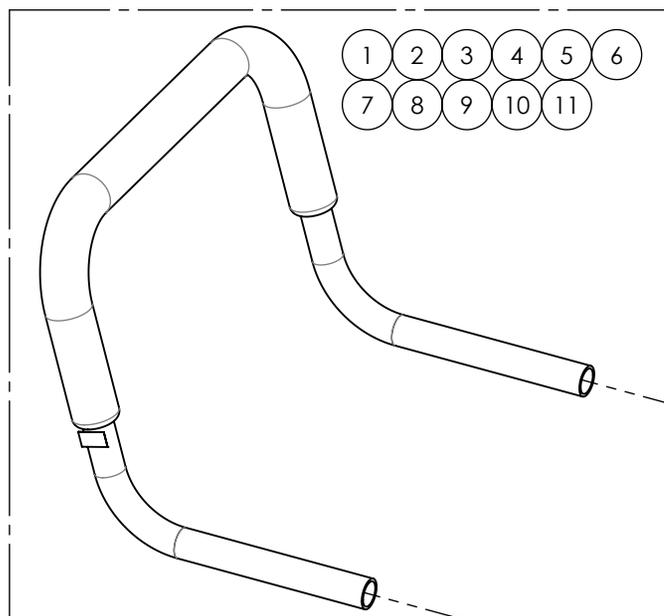


UTILISER LE MANCHON #0032001A-00 SI LA POIGNÉE DE POUSETTE (#0051523A À #0051533A) SERA INSTALLÉE AVEC LES MONTANTS DE DOSSIER ALUMINIUM DROIT AVEC POIGNÉE INTÉGRÉE (#9003298A OU #9003299A)

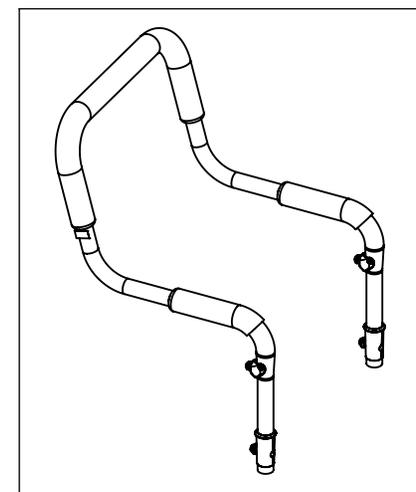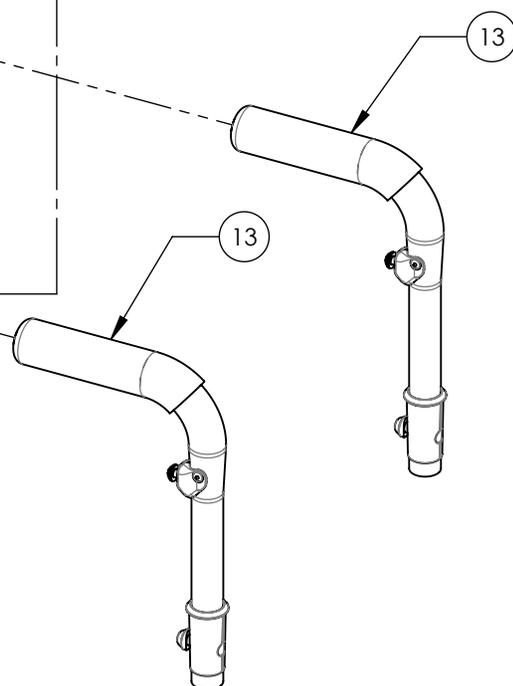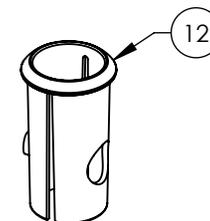






**Catalogue de montants de dossier**  
**Montant de dossier avec poignée intégrée**

\* NOTE: UTILISER LE MANCHON #0032001A-00 SI L'UNE DE CES OPTIONS SERA INSTALLÉE AVEC LES MONTANTS DE DOSSIER ALUMINIUM DROIT AVEC POIGNÉE INTÉGRÉE (#9003298A OU #9003299A)

1. POIGNÉE DE POUSSETTE (#9001605A À #9001613A)
2. BARRE DE TENSION NEWTON (#9001594A À #9001604)

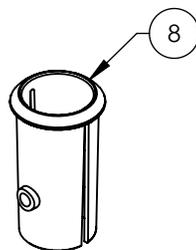


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                   | QTÉ |
|----------|-------------|---|-----|
| 1*       | 9003298A-00 | MONTANT - ALU, IPH, DROIT 9-15po              | 1   |
| 2*       | 9003299A-00 | MONTANT - ALU, IPH, DROIT 15-21po             | 1   |
| 3        | 9001275A-00 | MONTANT - ALU, IPH, 8°@8po, 16, 18 OU 20po    | 1   |
| 4        | 9001276A-00 | MONTANT - ALU, IPH, ANGLE AJUST, 8°@8po, 16po | 1   |
| 5        | 9001277A-00 | MONTANT - ALU, IPH, ANGLE AJUST, 8°@8po, 20po | 1   |
| 6        | 0007415A-00 | MONTANT- ALU, IPH, DROIT 21-24po              | 1   |
| 7        | 0007417A-00 | MONTANT- ALU, IPH, 8°, 21-24po                | 1   |
| 8        | 0032001A-00 | MANCHON POIGNÉE DE POUSSETTE                  | 1   |

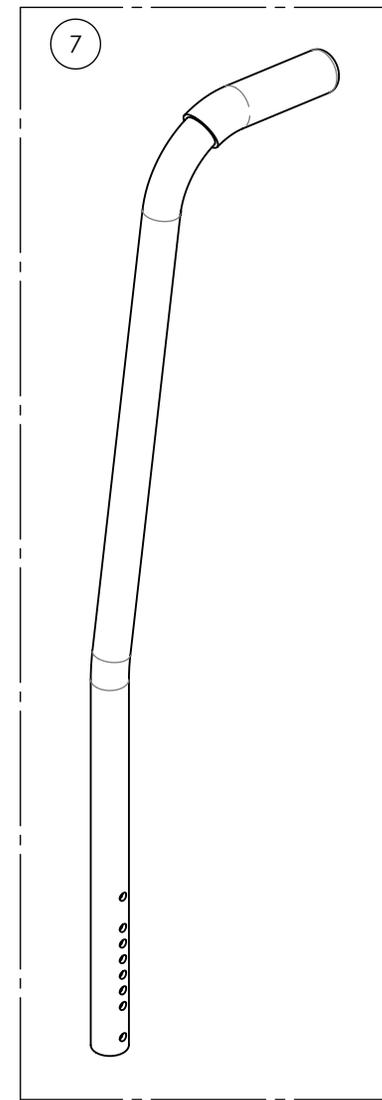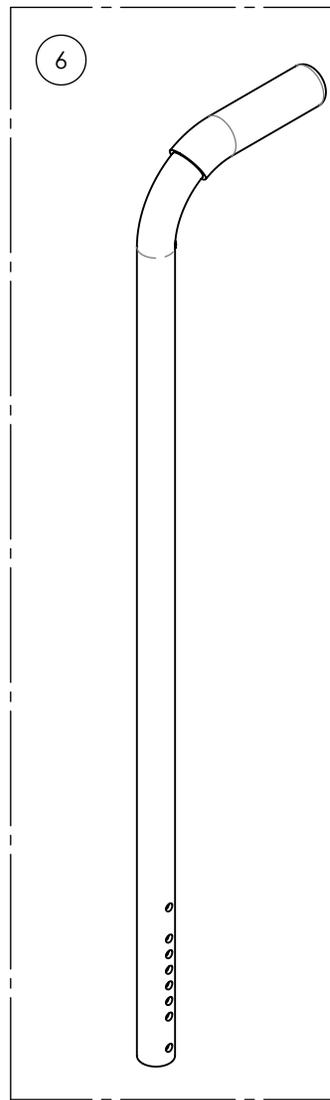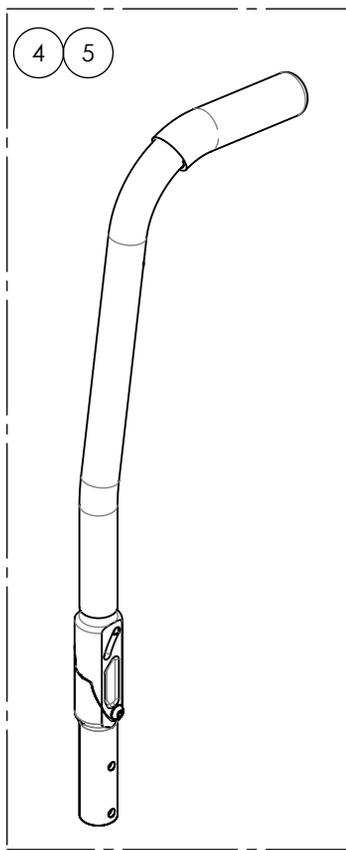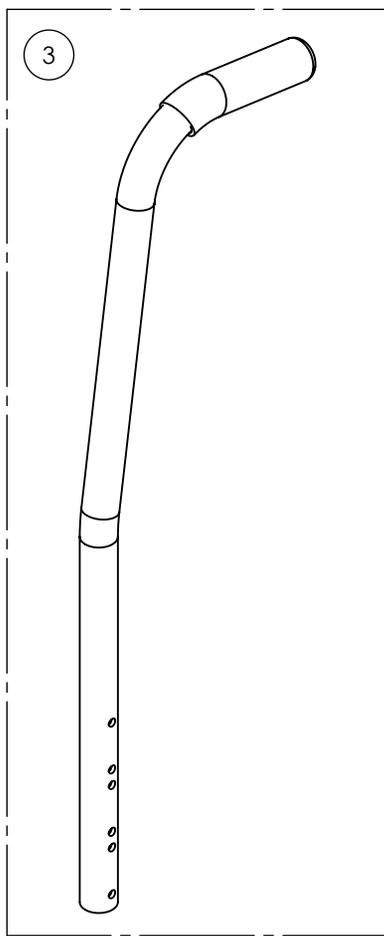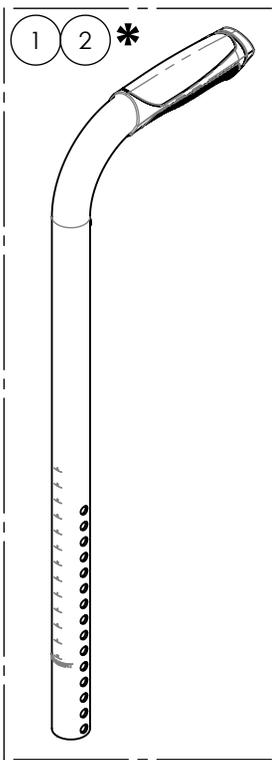

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

0060550A\_0060604A  
DS NYLON

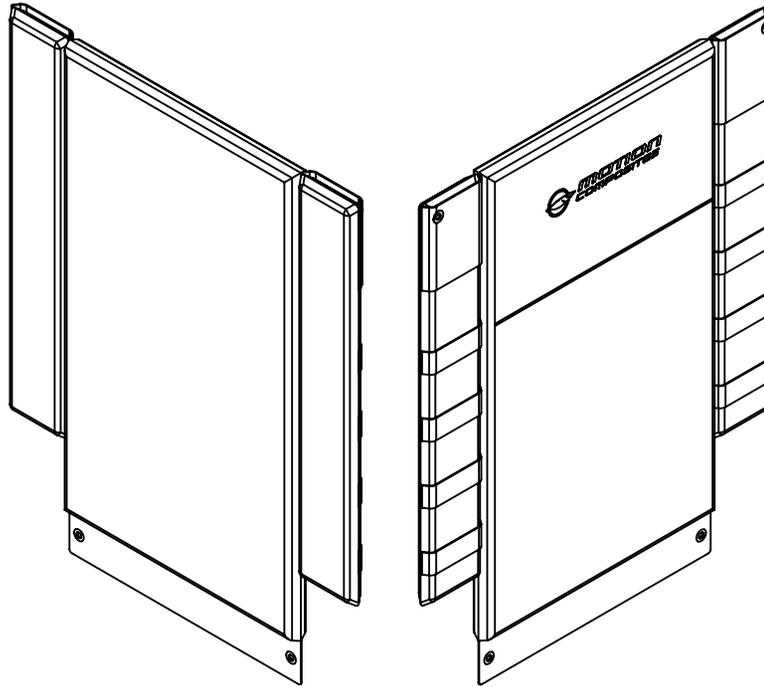


*ex: 0060550A -00*

| Instance | # Patch Velcro à Boucles |
|----------|--------------------------|
| -00      | Aucun                    |
| -01      | 1 patch velcro           |
| -02      | 2 patchs velcro          |
| -03      | 3 patchs velcro          |
| -04      | 4 patchs velcro          |
| -05      | 5 patchs velcro          |
| -06      | 6 patchs velcro          |

| DOSSIER SOUPLE<br>NYLON      |           | LONGUEUR en pouces (cm) |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |           | 9-12 (22.9-30.5)        | 12-15 (30.5-38.1) | 15-18 (38.1-45.7) | 18-21 (45.7-53.3) | 21-24 (53.3-60.9) |
| LARGEUR<br>en pouces<br>(cm) | 12 (30.5) | 0060550A-00             | 0060551A-00       | 0060552A-00       | 0060553A-00       | 0060554A-00       |
|                              | 13 (33.0) | 0060555A-00             | 0060556A-00       | 0060557A-00       | 0060558A-00       | 0060559A-00       |
|                              | 14 (35.6) | 0060560A-00             | 0060561A-00       | 0060562A-00       | 0060563A-00       | 0060564A-00       |
|                              | 15 (38.1) | 0060565A-00             | 0060566A-00       | 0060567A-00       | 0060568A-00       | 0060569A-00       |
|                              | 16 (40.6) | 0060570A-00             | 0060571A-00       | 0060572A-00       | 0060573A-00       | 0060574A-00       |
|                              | 17 (43.2) | 0060575A-00             | 0060576A-00       | 0060577A-00       | 0060578A-00       | 0060579A-00       |
|                              | 18 (45.7) | 0060580A-00             | 0060581A-00       | 0060582A-00       | 0060583A-00       | 0060584A-00       |
|                              | 19 (48.3) | 0060585A-00             | 0060586A-00       | 0060587A-00       | 0060588A-00       | 0060589A-00       |
|                              | 20 (50.8) | 0060590A-00             | 0060591A-00       | 0060592A-00       | 0060593A-00       | 0060594A-00       |
|                              | 21 (53.3) | 0060595A-00             | 0060596A-00       | 0060597A-00       | 0060598A-00       | 0060599A-00       |
|                              | 22 (55.9) | 0060600A-00             | 0060601A-00       | 0060602A-00       | 0060603A-00       | 0060604A-00       |

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


**0061910A\_0061949A & 0062220A\_0062318A**  
**COUSSIN VELCRO À BOUCLE 2po**

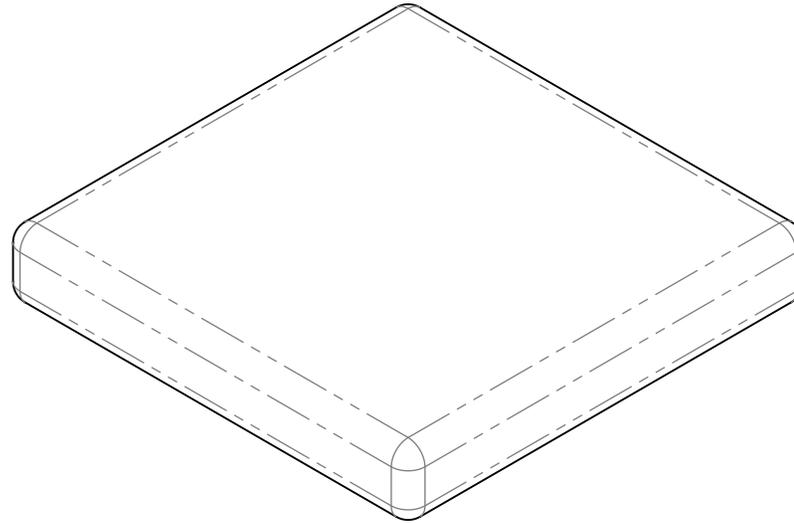

| COUSSIN 2po               |           | PROFONDEUR en pouces (cm) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                           |           | 10 (25.4)                 | 11 (27.9) | 12 (30.5) | 13 (33.0) | 14 (35.6) | 15 (38.1) | 16 (40.6) | 17 (43.2) | 18 (45.7) | 19 (48.3) | 20 (50.8) |
| LARGEUR en<br>pouces (cm) | 10 (25.4) | 0061910                   | 0061911   | 0061912   | 0061913   | 0061914   | 0061915   | 0061916   | 0061917   | 0061918   | 0061919   | 0061920   |
|                           | 11 (27.9) | 0061921                   | 0061922   | 0061923   | 0061924   | 0061925   | 0061926   | 0061927   | 0061928   | 0061929   | 0061930   | 0061931   |
|                           | 12 (30.5) | 0061932                   | 0061933   | 0062220   | 0062221   | 0062222   | 0062223   | 0062224   | 0062225   | 0062226   | 0062227   | 0062228   |
|                           | 13 (33.0) | 0061934                   | 0061935   | 0062229   | 0062230   | 0062231   | 0062232   | 0062233   | 0062234   | 0062235   | 0062236   | 0062237   |
|                           | 14 (35.6) | 0061936                   | 0061937   | 0062238   | 0062239   | 0062240   | 0062241   | 0062242   | 0062243   | 0062244   | 0062245   | 0062246   |
|                           | 15 (38.1) | 0061938                   | 0061939   | 0062247   | 0062248   | 0062249   | 0062250   | 0062251   | 0062252   | 0062253   | 0062254   | 0062255   |
|                           | 16 (40.6) | 0061940                   | 0061941   | 0062256   | 0062257   | 0062258   | 0062259   | 0062260   | 0062261   | 0062262   | 0062263   | 0062264   |
|                           | 17 (43.2) | 0061942                   | 0061943   | 0062265   | 0062266   | 0062267   | 0062268   | 0062269   | 0062270   | 0062271   | 0062272   | 0062273   |
|                           | 18 (45.7) | 0061944                   | 0061945   | 0062274   | 0062275   | 0062276   | 0062277   | 0062278   | 0062279   | 0062280   | 0062281   | 0062282   |
|                           | 19 (48.3) | 0061946                   | 0061947   | 0062283   | 0062284   | 0062285   | 0062286   | 0062287   | 0062288   | 0062289   | 0062290   | 0062291   |
| 20 (50.8)                 | 0061948   | 0061949                   | 0062292   | 0062293   | 0062294   | 0062295   | 0062296   | 0062297   | 0062298   | 0062299   | 0062300   |           |

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


**0061950A\_0061989A & 0062319A\_0062417A**  
**COUSSIN VELCRO À BOUCLE 3po**

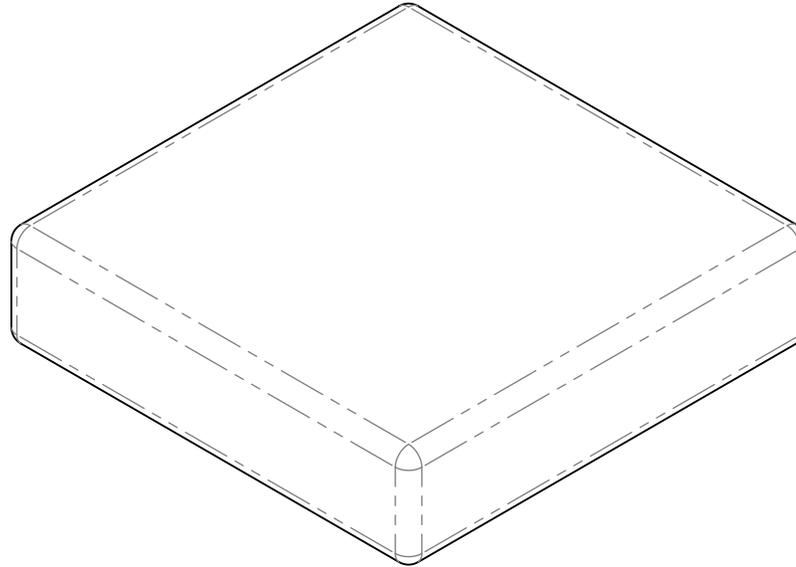

| COUSSIN 3 po              |           | PROFONDEUR en pouces (cm) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                           |           | 10 (25.4)                 | 11 (27.9) | 12 (30.5) | 13 (33.0) | 14 (35.6) | 15 (38.1) | 16 (40.6) | 17 (43.2) | 18 (45.7) | 19 (48.3) | 20 (50.8) |
| LARGEUR en<br>pouces (cm) | 10 (25.4) | 0061950                   | 0061951   | 0061952   | 0061953   | 0061954   | 0061955   | 0061956   | 0061957   | 0061958   | 0061959   | 0061960   |
|                           | 11 (27.9) | 0061961                   | 0061962   | 0061963   | 0061964   | 0061965   | 0061966   | 0061967   | 0061968   | 0061969   | 0061970   | 0061971   |
|                           | 12 (30.5) | 0061972                   | 0061973   | 0062319   | 0062320   | 0062321   | 0062322   | 0062323   | 0062324   | 0062325   | 0062326   | 0062327   |
|                           | 13 (33.0) | 0061974                   | 0061975   | 0062328   | 0062329   | 0062330   | 0062331   | 0062332   | 0062333   | 0062334   | 0062335   | 0062336   |
|                           | 14 (35.6) | 0061976                   | 0061977   | 0062337   | 0062338   | 0062339   | 0062340   | 0062341   | 0062342   | 0062343   | 0062344   | 0062345   |
|                           | 15 (38.1) | 0061978                   | 0061979   | 0062346   | 0062347   | 0062348   | 0062349   | 0062350   | 0062351   | 0062352   | 0062353   | 0062354   |
|                           | 16 (40.6) | 0061980                   | 0061981   | 0062355   | 0062356   | 0062357   | 0062358   | 0062359   | 0062360   | 0062361   | 0062362   | 0062363   |
|                           | 17 (43.2) | 0061982                   | 0061983   | 0062364   | 0062365   | 0062366   | 0062367   | 0062368   | 0062369   | 0062370   | 0062371   | 0062372   |
|                           | 18 (45.7) | 0061984                   | 0061985   | 0062373   | 0062374   | 0062375   | 0062376   | 0062377   | 0062378   | 0062379   | 0062380   | 0062381   |
|                           | 19 (48.3) | 0061986                   | 0061987   | 0062382   | 0062383   | 0062384   | 0062385   | 0062386   | 0062387   | 0062388   | 0062389   | 0062390   |
| 20 (50.8)                 | 0061988   | 0061989                   | 0062391   | 0062392   | 0062393   | 0062394   | 0062395   | 0062396   | 0062397   | 0062398   | 0062399   |           |

**9001646A 9001744A  
TOILE DE SIÈGE CROCHET**

| REPLACEMENT DE PIÈCES                      |             |
|--|-------------|
| GUIDE TOILE DE SIÈGE À GLISSIÈRE 12po (1x) | 0012173A-00 |
| GUIDE TOILE DE SIÈGE À GLISSIÈRE 13po (1x) | 0012174A-00 |
| GUIDE TOILE DE SIÈGE À GLISSIÈRE 14po (1x) | 0012175A-00 |
| GUIDE TOILE DE SIÈGE À GLISSIÈRE 15po (1x) | 0012176A-00 |
| GUIDE TOILE DE SIÈGE À GLISSIÈRE 16po (1x) | 0012177A-00 |
| GUIDE TOILE DE SIÈGE À GLISSIÈRE 17po (1x) | 0012178A-00 |
| GUIDE TOILE DE SIÈGE À GLISSIÈRE 18po (1x) | 0012179A-00 |
| GUIDE TOILE DE SIÈGE À GLISSIÈRE 19po (1x) | 0012180A-00 |
| GUIDE TOILE DE SIÈGE À GLISSIÈRE 20po (1x) | 0012181A-00 |

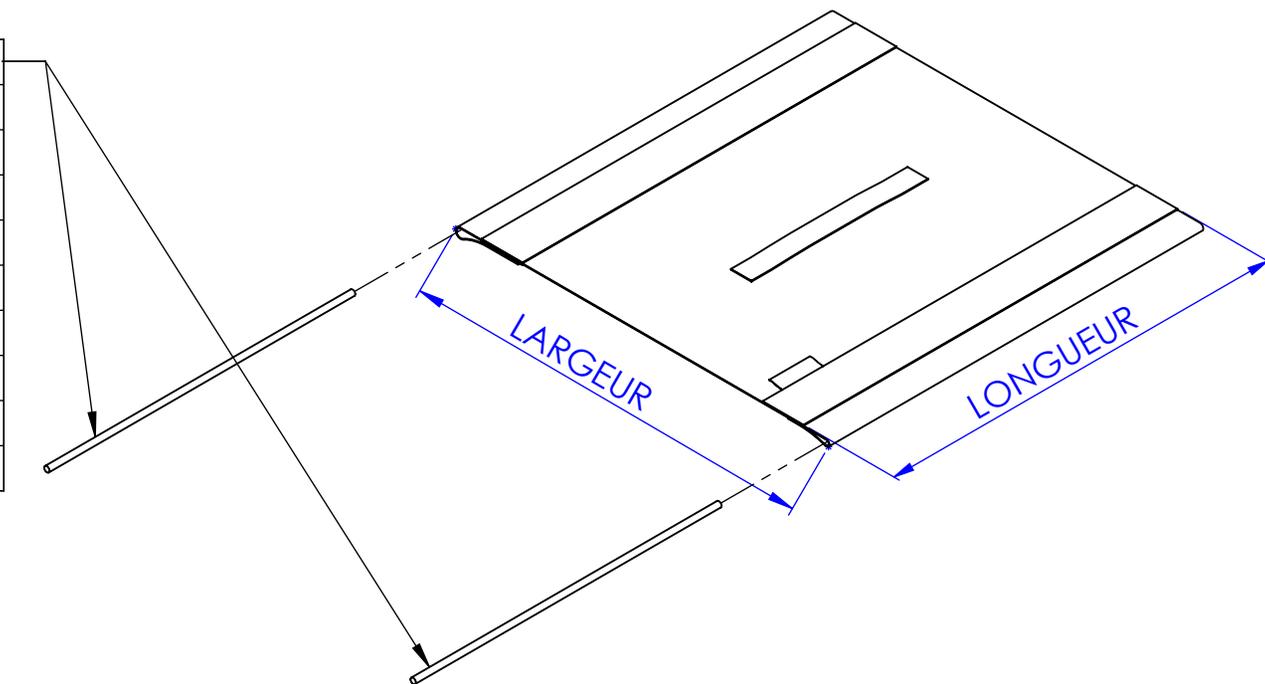


| ex: 9001646A-00 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Instance        | Particularité Toile de Dossier |
| -00             | Standard                       |
| -01             | avec Courroie de Fermeture     |

| 2X guides de toile<br>à glissière inclus |           | LONGUEUR en pouces (cm) |           |           |           |           |           |           |           |           |
|--|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |           | 12 (30.5)               | 13 (33.0) | 14 (35.6) | 15 (38.1) | 16 (40.6) | 17 (43.2) | 18 (45.7) | 19 (48.3) | 20 (50.8) |
| <b>LARGEUR</b><br>en pouces<br>(cm)      | 12 (30.5) | 9001646A                | 9001647A  | 9001648A  | 9001649A  | 9001650A  | 9001651A  | 9001652A  | 9001653A  | 9001654A  |
|  | 13 (33.0) | 9001655A                | 9001656A  | 9001657A  | 9001658A  | 9001659A  | 9001660A  | 9001661A  | 9001662A  | 9001663A  |
|  | 14 (35.6) | 9001664A                | 9001665A  | 9001666A  | 9001667A  | 9001668A  | 9001669A  | 9001670A  | 9001671A  | 9001672A  |
|  | 15 (38.1) | 9001673A                | 9001674A  | 9001675A  | 9001676A  | 9001677A  | 9001678A  | 9001679A  | 9001680A  | 9001681A  |
|  | 16 (40.6) | 9001682A                | 9001683A  | 9001684A  | 9001685A  | 9001686A  | 9001687A  | 9001688A  | 9001689A  | 9001690A  |
|  | 17 (43.2) | 9001691A                | 9001692A  | 9001693A  | 9001694A  | 9001695A  | 9001696A  | 9001697A  | 9001698A  | 9001699A  |
|  | 18 (45.7) | 9001700A                | 9001701A  | 9001702A  | 9001703A  | 9001704A  | 9001705A  | 9001706A  | 9001707A  | 9001708A  |
|  | 19 (48.3) | 9001709A                | 9001710A  | 9001711A  | 9001712A  | 9001713A  | 9001714A  | 9001715A  | 9001716A  | 9001717A  |
|  | 20 (50.8) | 9001718A                | 9001719A  | 9001720A  | 9001721A  | 9001722A  | 9001723A  | 9001724A  | 9001725A  | 9001726A  |
|  | 21 (53.3) | 9001727A                | 9001728A  | 9001729A  | 9001730A  | 9001731A  | 9001732A  | 9001733A  | 9001734A  | 9001735A  |
| 22 (55.9)                                | 9001736A  | 9001737A                | 9001738A  | 9001739A  | 9001740A  | 9001741A  | 9001742A  | 9001743A  | 9001744A  |           |




ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

9008230 9008294  
DTR NYLON V2

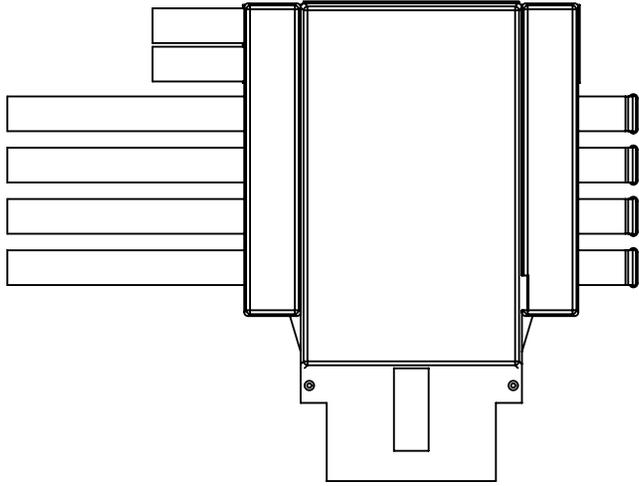

Tous les dossiers ont le nombre appropriés de sangles


## Sangles de remplacement pour dossier

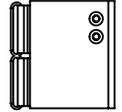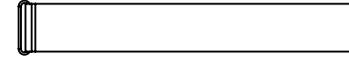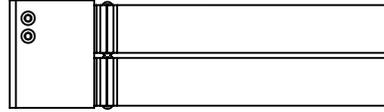

| Sangles Hautes |                            | Sangles Basses               |                            |
|----------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1 par Dossier  |                            | Qté selon hauteur du dossier |                            |
| No. Item       | Largeur de dossier po (cm) | No. Item                     | Largeur de dossier po (cm) |
| 0063110A-00    | 12-13 (30.5-33)            | 0063117A-00                  | 12-13 (30.5-33)            |
| 0063111A-00    | 14-15 (35.6-38.1)          | 0063118A-00                  | 14-15 (35.6-38.1)          |
| 0063112A-00    | 16-17 (40.6-43.2)          | 0063119A-00                  | 16-17 (40.6-43.2)          |
| 0063113A-00    | 18-19 (45.7-48.3)          | 0063120A-00                  | 18-19 (45.7-48.3)          |
| 0063114A-00    | 20-21 (50.8-53.3)          | 0063121A-00                  | 20-21 (50.8-53.3)          |
| 0063115A-00    | 22-23 (55.9-58.4)          | 0063122A-00                  | 22-23 (55.9-58.4)          |

| Oreillette    |
|---------------|
| 1 par Dossier |
| No. Item      |
| 0063124A-00   |

| DOSSIER SOUPLE À TENSION RÉGLABLE NYLON V2 |           | LONGUEUR en pouces (cm)      |                              |                              |                              |                              |
|--|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |           | 9-12 (22.9-30.5)             | 12-15 (30.5-38.1)            | 15-18 (38.1-45.7)            | 18-21 (45.7-53.3)            | 21-24 (53.3-60.9)            |
| LARGEUR en pouces (cm)                     | 12 (30.5) | 9008230A-00<br>(0060605B-00) | 9008231A-00<br>(0060606B-00) | 9008232A-00<br>(0060607B-00) | 9008233A-00<br>(0060608B-00) | 9008234A-00<br>(0060609B-00) |
|  | 13 (33.0) | 9008235A-00<br>(0060610B-00) | 9008236A-00<br>(0060611B-00) | 9008237A-00<br>(0060612B-00) | 9008238A-00<br>(0060613B-00) | 9008239A-00<br>(0060614B-00) |
|  | 14 (35.6) | 9008240A-00<br>(0060615B-00) | 9008241A-00<br>(0060616B-00) | 9008242A-00<br>(0060617B-00) | 9008243A-00<br>(0060618B-00) | 9008244A-00<br>(0060619B-00) |
|  | 15 (38.1) | 9008245A-00<br>(0060620B-00) | 9008246A-00<br>(0060621B-00) | 9008247A-00<br>(0060622B-00) | 9008248A-00<br>(0060623B-00) | 9008249A-00<br>(0060624B-00) |
|  | 16 (40.6) | 9008250A-00<br>(0060625B-00) | 9008251A-00<br>(0060626B-00) | 9008252A-00<br>(0060627B-00) | 9008253A-00<br>(0060628B-00) | 9008254A-00<br>(0060629B-00) |
|  | 17 (43.2) | 9008255A-00<br>(0060630B-00) | 9008256A-00<br>(0060631B-00) | 9008257A-00<br>(0060632B-00) | 9008258A-00<br>(0060633B-00) | 9008259A-00<br>(0060634B-00) |
|  | 18 (45.7) | 9008260A-00<br>(0060635B-00) | 9008261A-00<br>(0060636B-00) | 9008262A-00<br>(0060637B-00) | 9008263A-00<br>(0060638B-00) | 9008264A-00<br>(0060639B-00) |
|  | 19 (48.3) | 9008265A-00<br>(0060640B-00) | 9008266A-00<br>(0060641B-00) | 9008267A-00<br>(0060642B-00) | 9008268A-00<br>(0060643B-00) | 9008269A-00<br>(0060644B-00) |
|  | 20 (50.8) | 9008270A-00<br>(0060645B-00) | 9008271A-00<br>(0060646B-00) | 9008272A-00<br>(0060647B-00) | 9008273A-00<br>(0060648B-00) | 9008274A-00<br>(0060649B-00) |
|  | 21 (53.3) | 9008275A-00<br>(0060650B-00) | 9008276A-00<br>(0060651B-00) | 9008277A-00<br>(0060652B-00) | 9008278A-00<br>(0060653B-00) | 9008279A-00<br>(0060654B-00) |
|  | 22 (55.9) | 9008280A-00<br>(0060655B-00) | 9008281A-00<br>(0060656B-00) | 9008282A-00<br>(0060657B-00) | 9008283A-00<br>(0060658B-00) | 9008284A-00<br>(0060659B-00) |

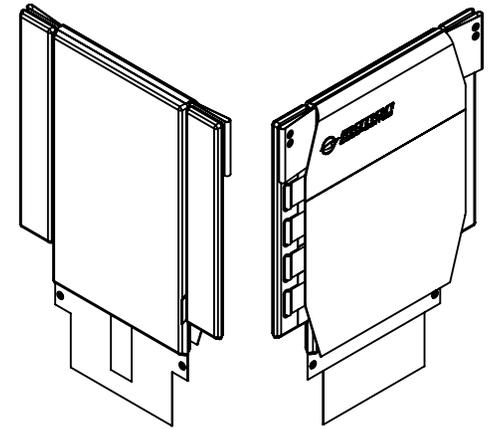


ex: 9008230A-00 (Dossier avec sangles)


ex: 0060605B-00 (Dossier seulement)

| Instance | # Patch Velcro à Boucles |
|----------|--------------------------|
| -00      | Aucun                    |
| -01      | 1 patch Velcro           |
| -02      | 2 patchs velcro          |
| -03      | 3 patchs velcro          |
| -04      | 4 patchs velcro          |
| -05      | 5 patchs velcro          |
| -06      | 6 patchs velcro          |

**Catalogue de dossier et d'assise**  
**Coussins**

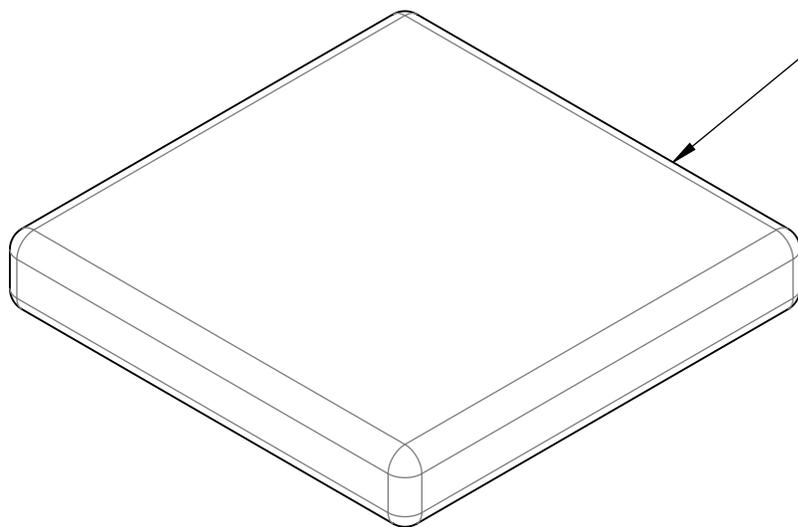


COUSSINS 2 po  
SE RÉFÉRER À L'ITEM  
0061910A\_0061949A &  
0062220A\_0062318A

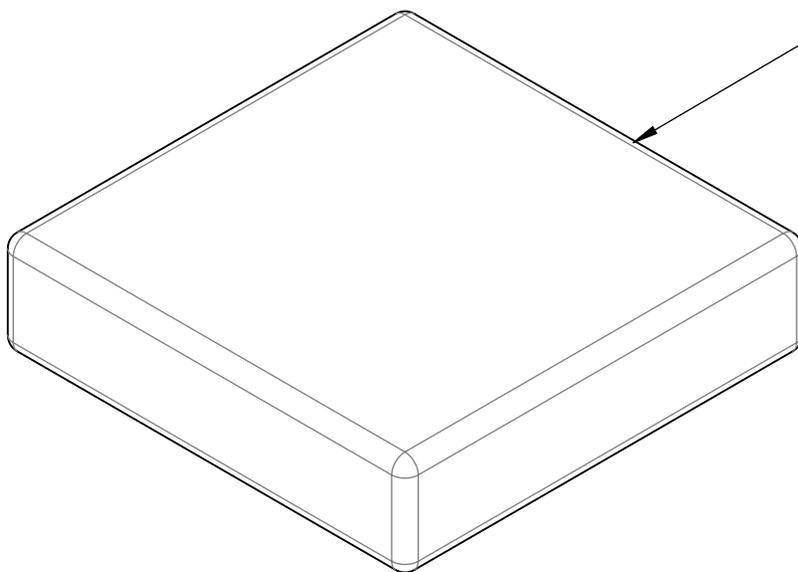

COUSSINS 3 po  
SE RÉFÉRER À L'ITEM  
0061950A\_0061989A &  
0062319A\_0062417A


**Catalogue de dossier et d'assise**  
**Toile de siège type 2 à glissière**

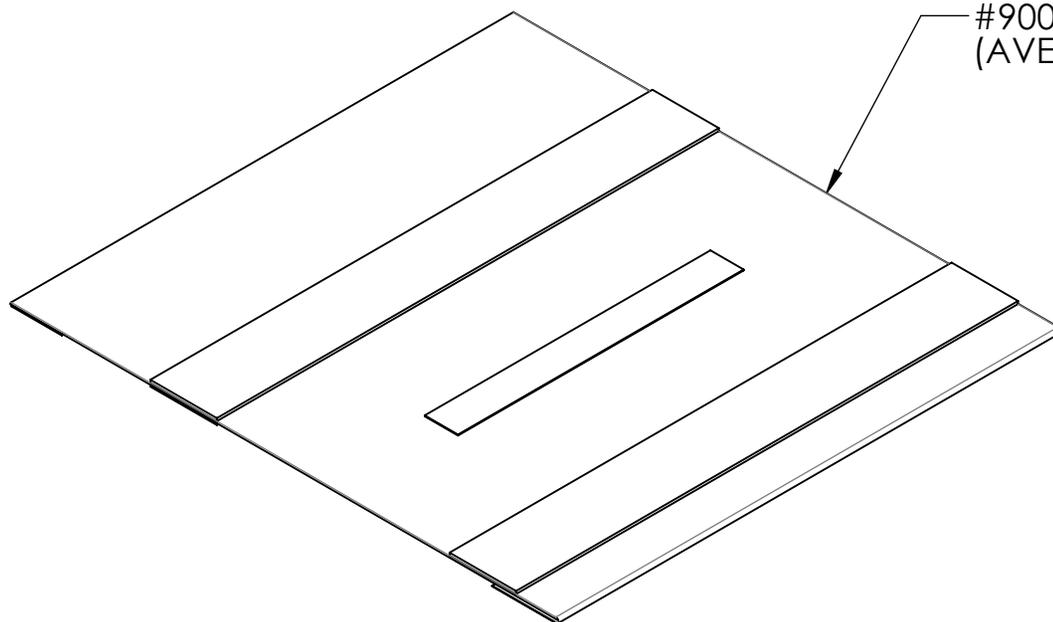

SE RÉFÉRER À L'ITEM  
#9001646\_9001744  
(AVEC CROCHETS VELCRO)

**Catalogue de dossier et d'assise**  
**Dossier - Souple & souple à tension réglable, nylon**


DOSSIER SOUPLE NYLON  
SE RÉFÉRER À L'ITEM  
# 0060550A\_0060604A  
POUR LARGEUR & LONGUEUR

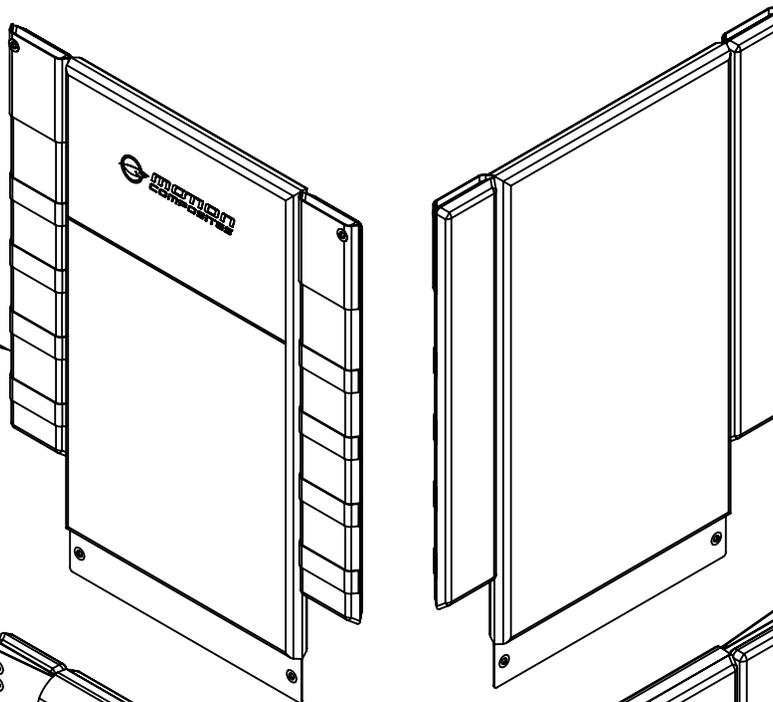

DOSSIER SOUPLE À TENSION RÉGLABLE  
NYLON  
SE RÉFÉRER À L'ITEM

# 9008230A\_9008294A \*\*\* NOUVEAU \*\*\*  
# 9007745A\_9007789A \*\*\* DÉSUET \*\*\*  
(POUR REMPLACEMENT DE SANGLES SEULEMENT)



POUR LARGEUR & LONGUEUR

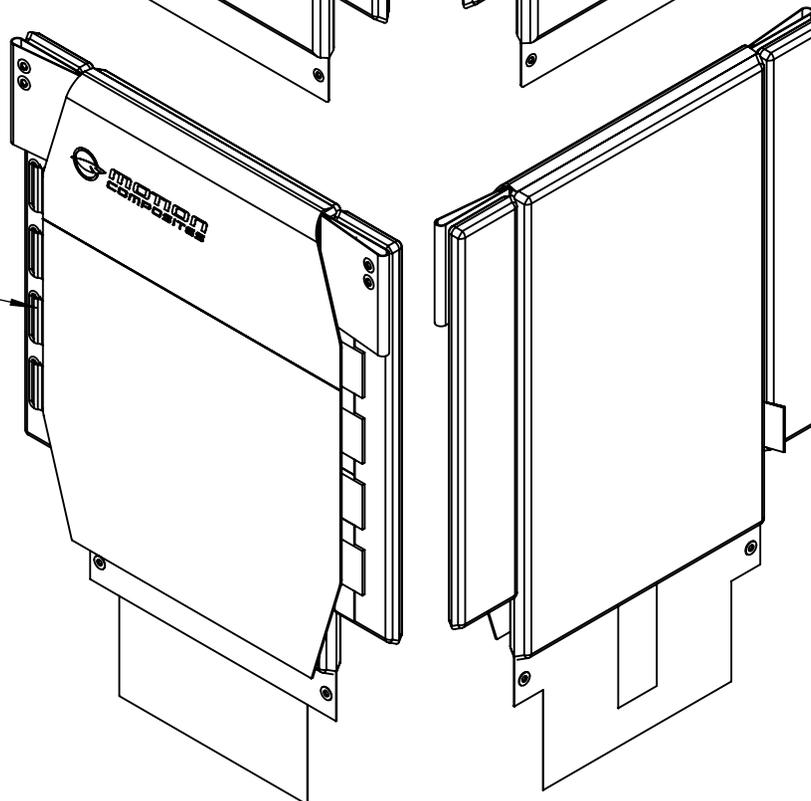

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**0005148A-00**  
**PLAQUE D'AJUSTEMENT CG T2 - ASSY**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                      | QTÉ |
|----------|-------------|----------------------------------|-----|
| 1        | 0090991A-00 | ÉCROU AUTOBLOQUANT MINCE M10x1.5 | 2   |
| 2        | 0021013A-00 | ADAPTATEUR PLAQUE AMPUTÉ V1      | 6   |
| 3        | 0002241A-00 | PLAQUE AJUSTEMENT CG             | 1   |
| 4        | 0005161A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M10x1.5x40mm L   | 2   |

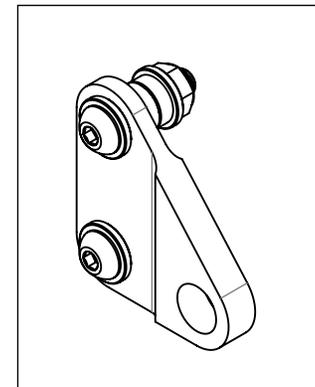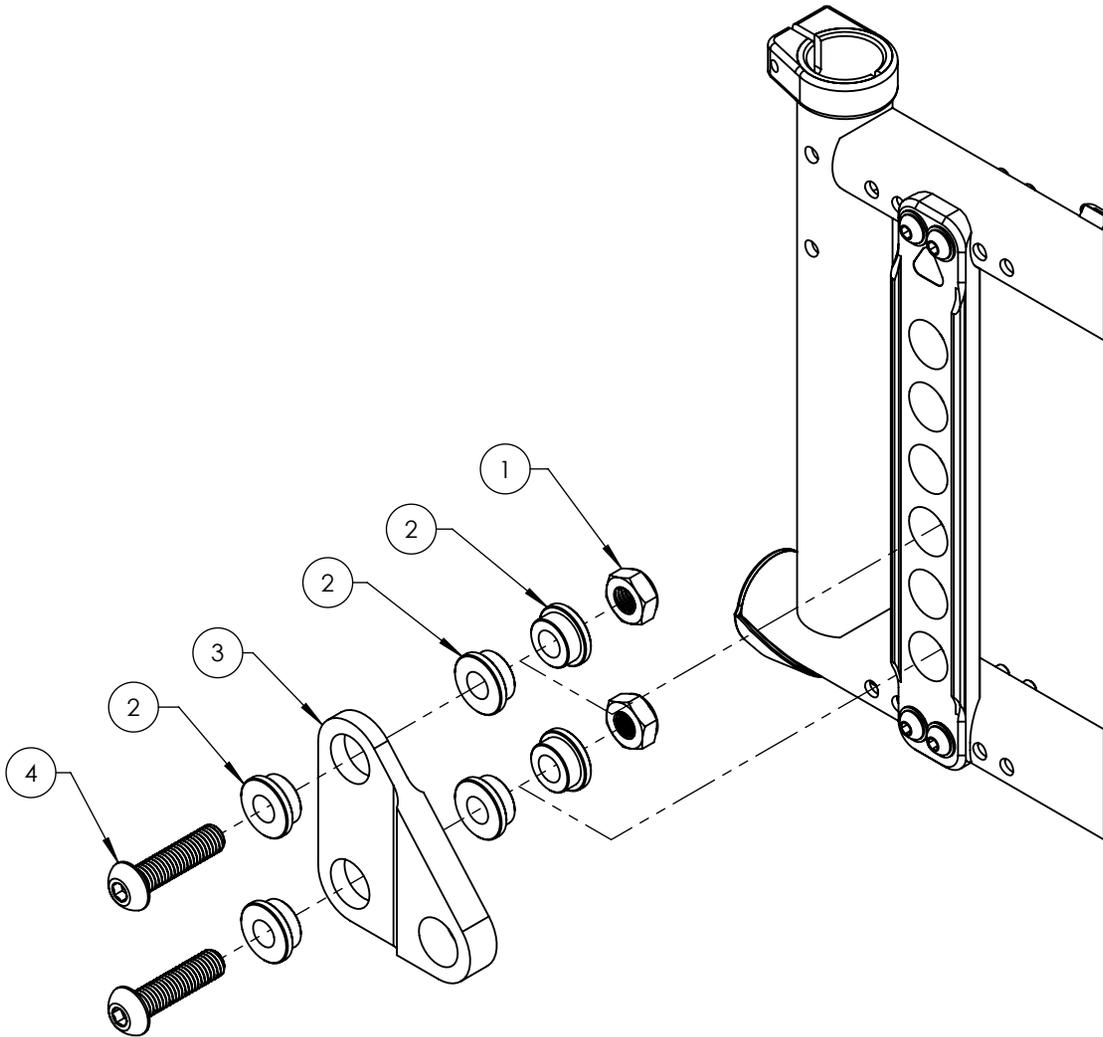


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**0007384A**  
**NEWTON ONE AVEC INSERT ANTI-CREVAISON & PNEUMATIQUE 1 $\frac{3}{8}$ po**

0007384A -


| NO. ITEM | NO. PIÈCE   | DESCRIPTION  | 00/QTÉ | 01/QTÉ |
|----------|-------------|--|--------|--------|
| 1        | 0021110B-00 | ROUE NEWTON ONE 22po   | 1      | -      |
| 2        | 0021111B-00 | ROUE NEWTON ONE 24po   | -      | 1      |
| 3        | 9002409A-00 | INSERT ANTI-CREVAISON & PNEUMATIQUE 1 $\frac{3}{8}$ x22po GRIS | 1      | -      |
| 4        | 9002410A-00 | INSERT ANTI-CREVAISON & PNEUMATIQUE 1 $\frac{3}{8}$ x24po GRIS | -      | 1      |

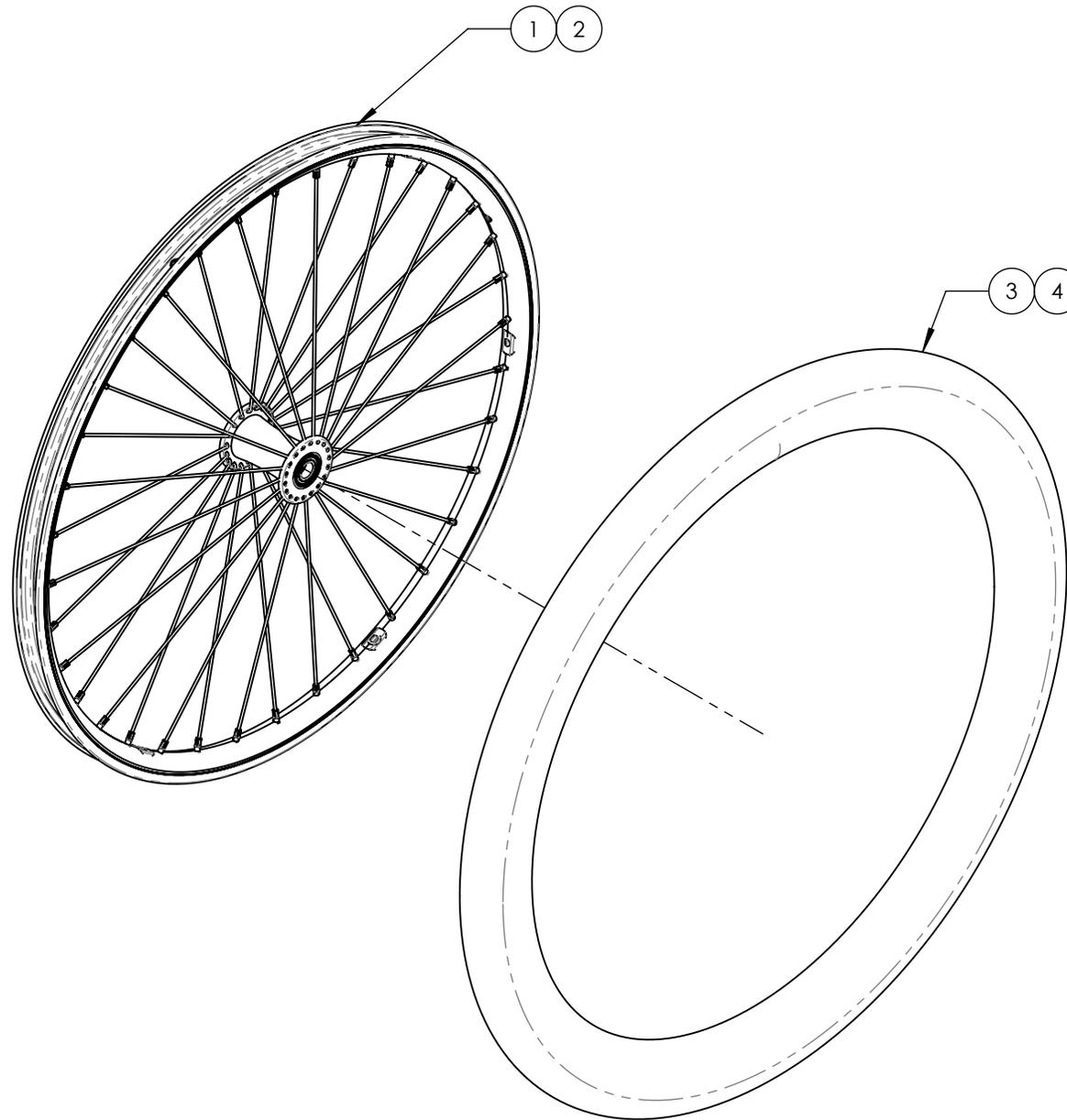

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**0007431A**  
**N. GRAVITY & ANTI-CREVAISON & PNEUMATIQUE 1 $\frac{3}{8}$ po**


| 0007431A - |             |   |         |         |         |
|------------|-------------|---|---------|---------|---------|
| NO. ITEM   | NO. PIÈCE   | DESCRIPTION   | 00/QTY. | 01/QTY. | 02/QTY. |
| 1          | 0021114A-00 | ROUE NEWTON GRAVITY 22po  | 1       | -       | -       |
| 2          | 0021115A-00 | ROUE NEWTON GRAVITY 24po  | -       | 1       | -       |
| 3          | 0021117A-00 | ROUE NEWTON GRAVITY 26po  | -       | -       | 1       |
| 4          | 9002409A-00 | INSERT ANTI-CREVAISON & PNEUMATIQUE<br>1 $\frac{3}{8}$ x22po GRIS | 1       | -       | -       |
| 5          | 9002410A-00 | INSERT ANTI-CREVAISON & PNEUMATIQUE<br>1 $\frac{3}{8}$ x24po GRIS | -       | 1       | -       |
| 6          | 9002412A-00 | INSERT ANTI-CREVAISON & PNEUMATIQUE<br>1 $\frac{3}{8}$ x26po GRIS | -       | -       | 1       |

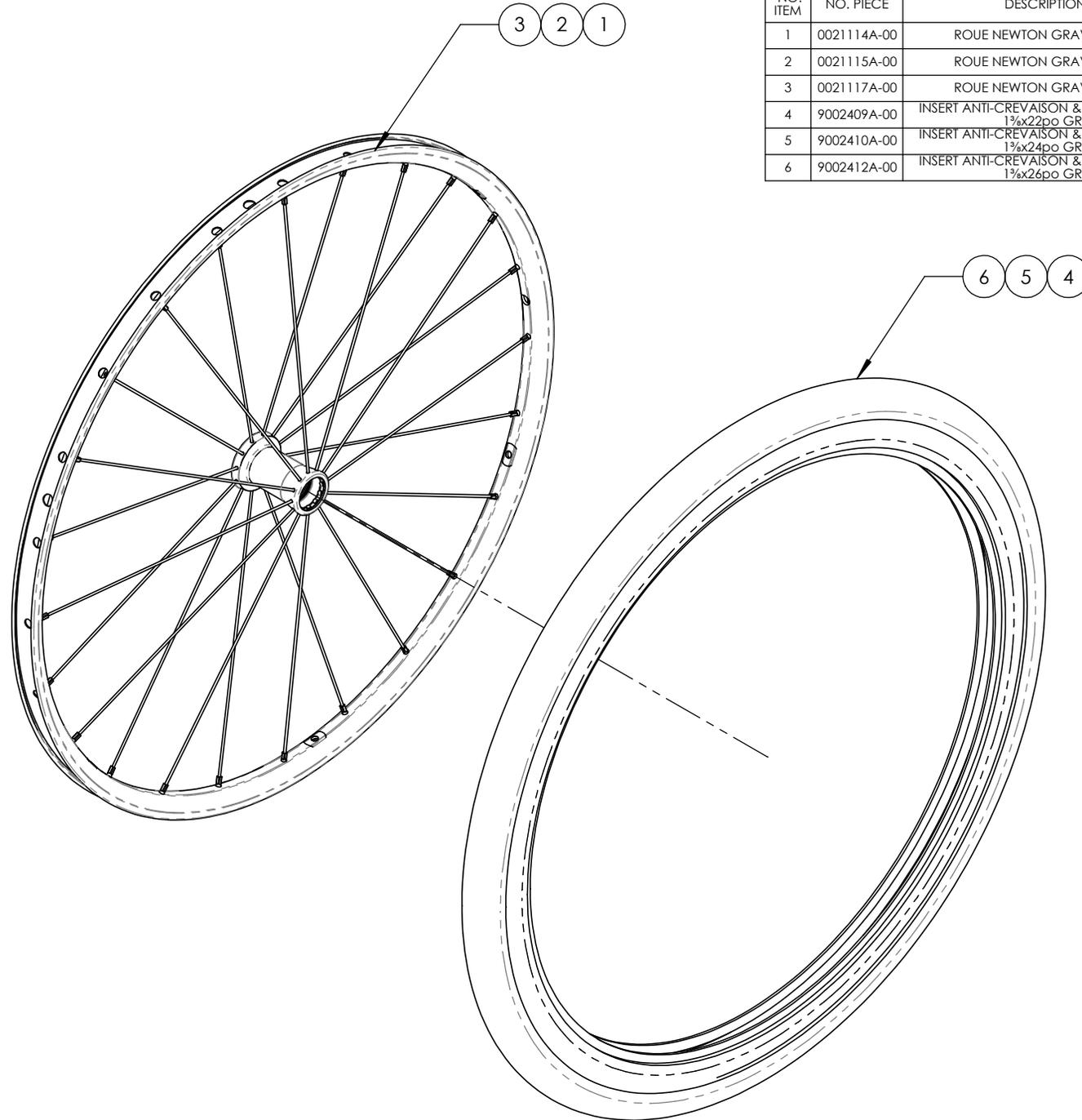


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001562A & 9002956A  
ESSIEU - FILLETÉ**



9001562A & 9002956A - ESSIEU - FILLETÉ POUR ROUE MAG

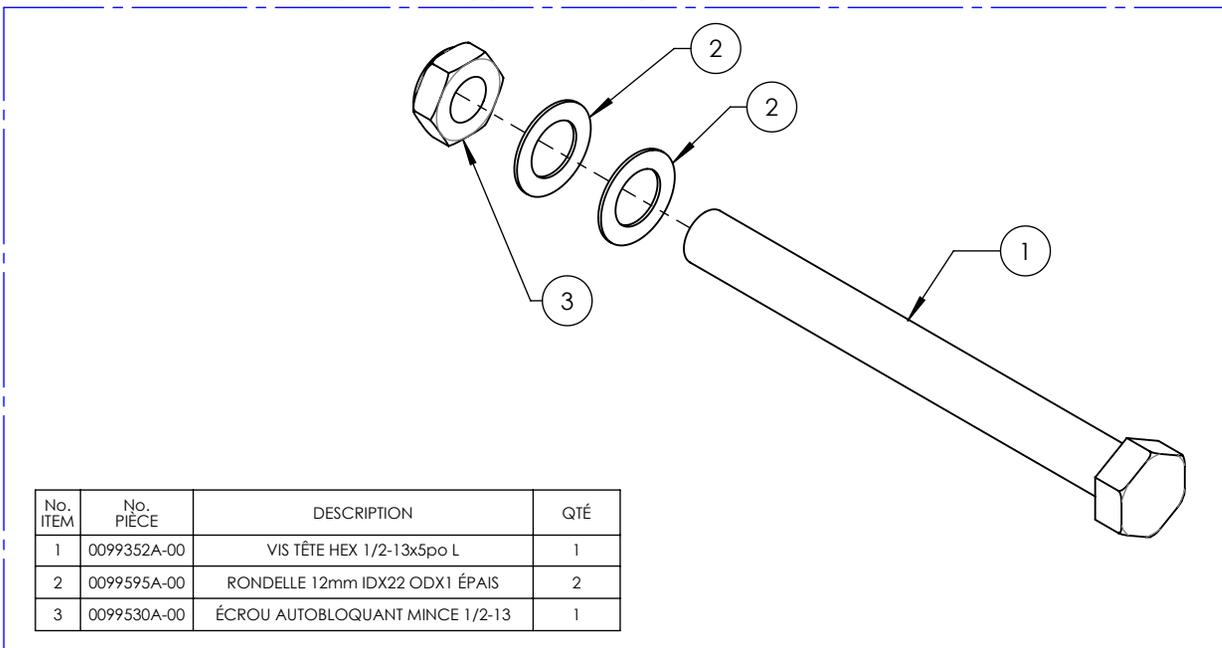


9001562A & 9002956A - ESSIEU - FILLETÉ

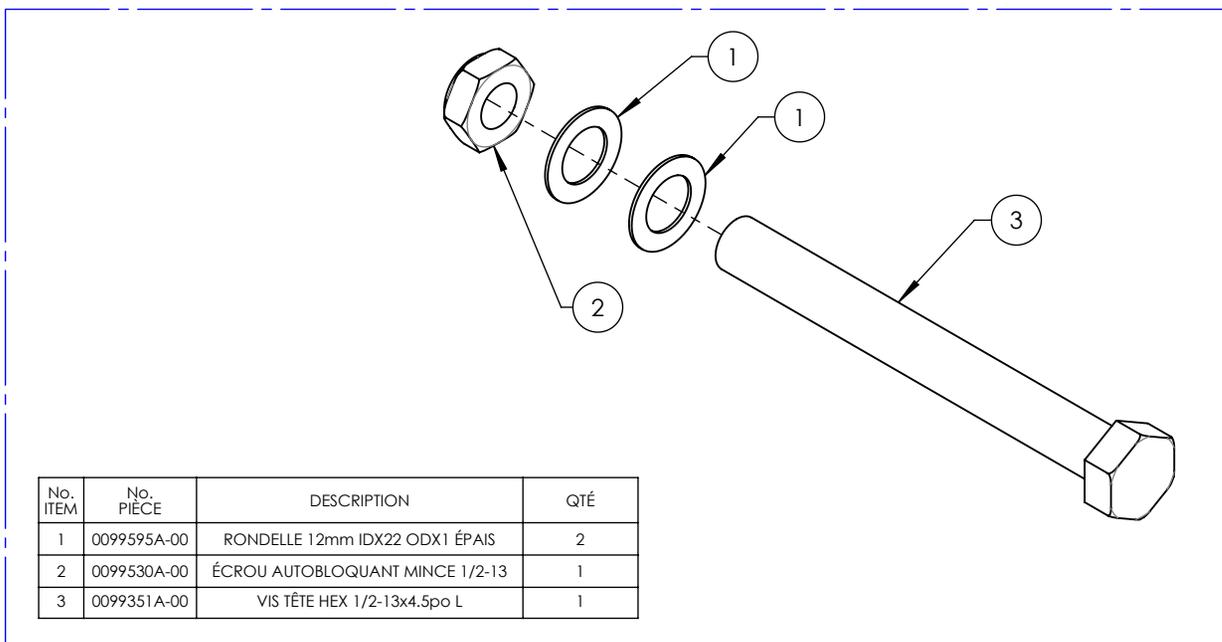


**9001629A 9001632A  
PROTÈGES-RAYONS**

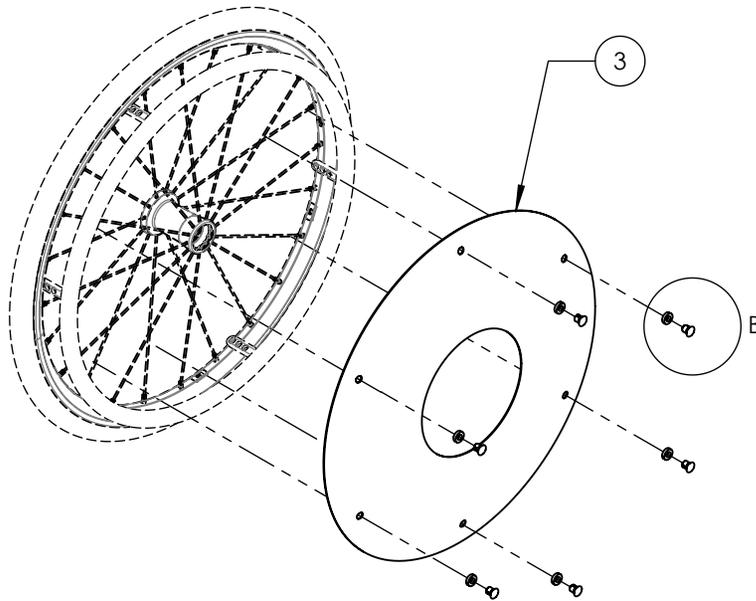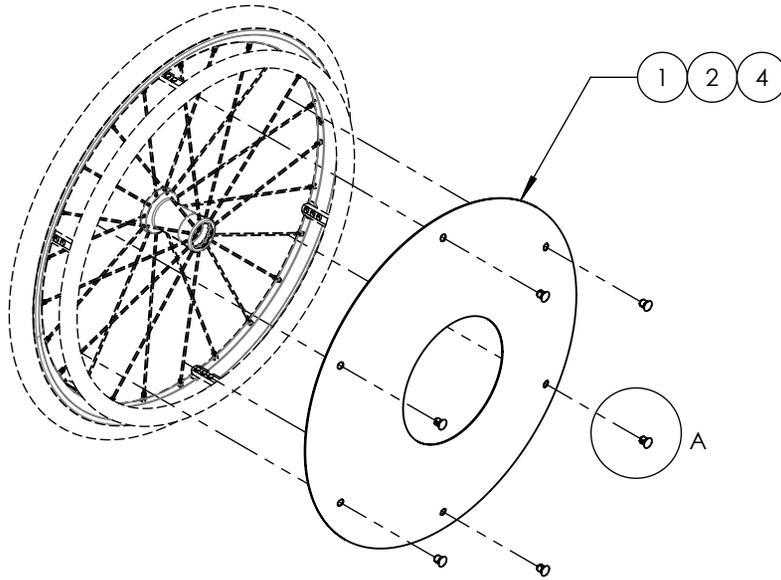

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                    | 9001629 | 9001630 | 9001631 | 9001632 |
|----------|-------------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1        | 0051019A-00 | PROTÈGE RAYON 20po             | 1       | -       | -       | -       |
| 2        | 0051020A-00 | PROTÈGE RAYON 22po             | -       | 1       | -       | -       |
| 3        | 0051021A-00 | PROTÈGE RAYON 24po             | -       | -       | 1       | -       |
| 4        | 0051025A-00 | PROTÈGE RAYON 26po             | -       | -       | -       | 1       |
| 5        | 0051034A-00 | ATTACHE PROTÈGE RAYON          | 6       | 6       | 6       | 6       |
| 6        | 0051033A-00 | RONDELLE ATTACHE PROTÈGE RAYON | -       | -       | 6       | -       |

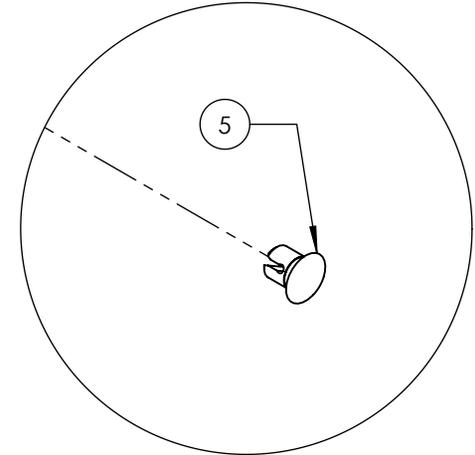

DETAIL A  
ÉCHELLE 5 : 8

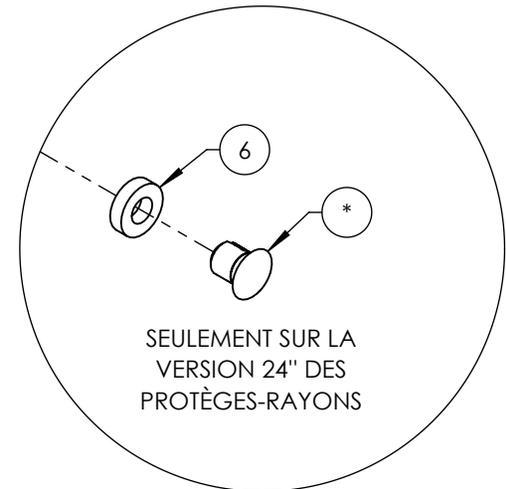


SEULEMENT SUR LA  
VERSION 24" DES  
PROTÈGES-RAYONS

DETAIL B  
ÉCHELLE 5 : 8

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9002388B-00**  
**PLAQUE D'EXTENSION AMPUTÉ - T5, DROITE**




| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                              | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 1        | 0021715A-00 | KIT AMPUTÉ V1 DROITE - ASSEMBLAGE MOTION | 1   |
| 2        | 9007810B-00 | PLAQUE MONTAGE - T5                      | 1   |

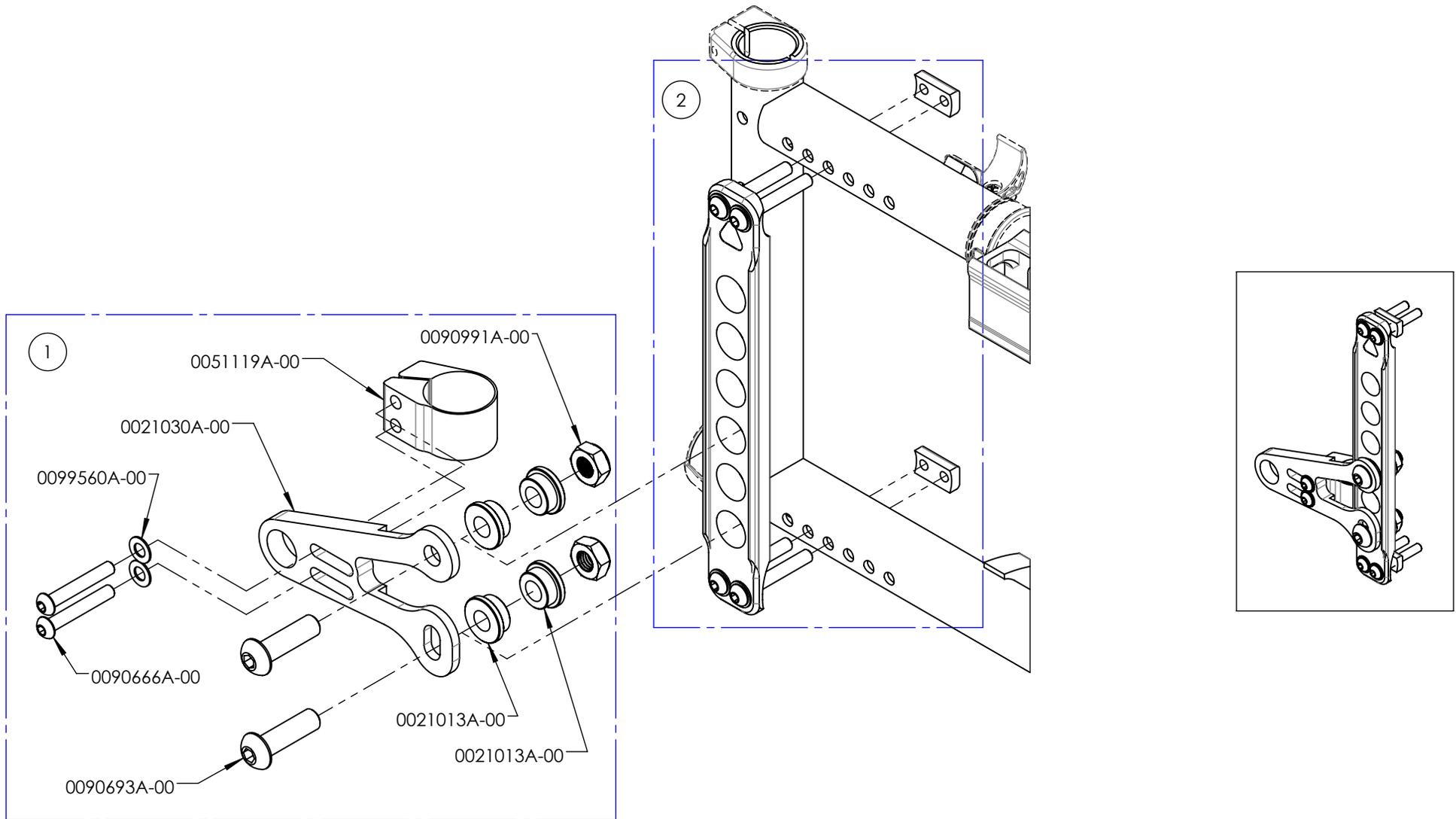

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9002390B-00**  
**PLAQUE D'EXTENSION AMPUTÉ - T5, GAUCHE**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                              | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 1        | 0021716A-00 | KIT AMPUTÉ V1 GAUCHE - ASSEMBLAGE MOTION | 1   |
| 2        | 9007810B-00 | PLAQUE MONTAGE - T5                      | 1   |

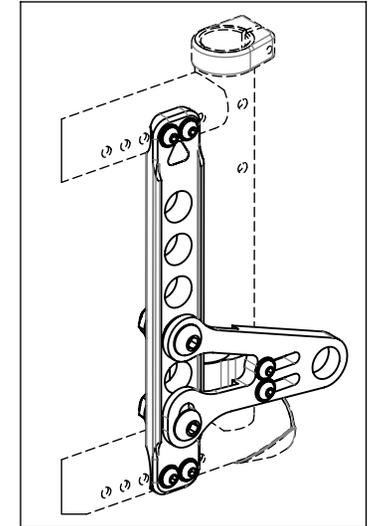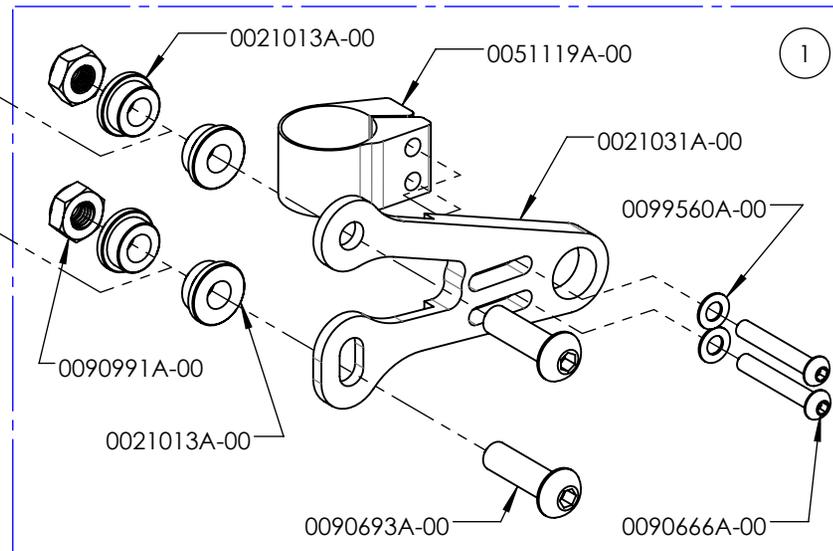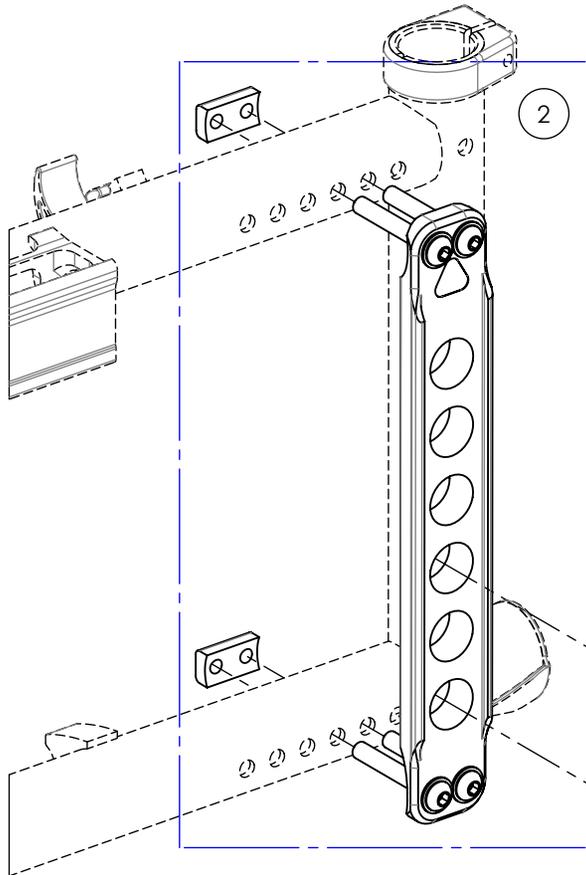


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9002395B 9002396B**  
**PLAQUE MONTAGE ROUE ARRIÈRE RÉVERSIBLE**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION            | 9002395 | 9002396 |
|----------|-------------|------------------------|---------|---------|
| 1        | 9007810B-00 | PLAQUE MONTAGE - T5    | 1       | 1       |
| 2        | 9002444A-00 | ESSIEU - RECEPTACLE 0° | 1       | -       |
| 3        | 9002445A-00 | ESSIEU - RECEPTACLE 3° | -       | 1       |

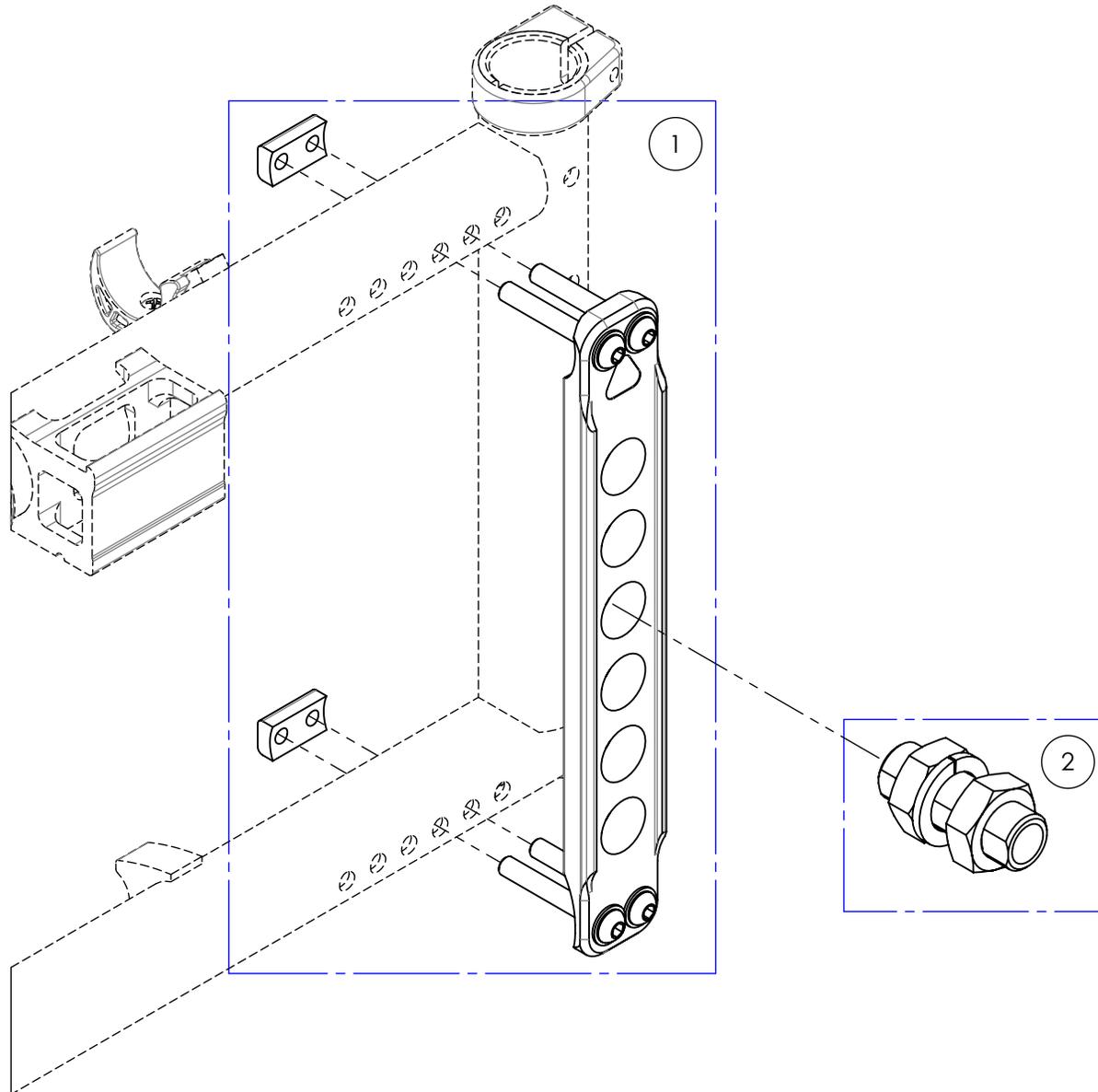

9002395A-00  
 MOUNTING PLATE - T5,  
 0° CAMBER ANGLE

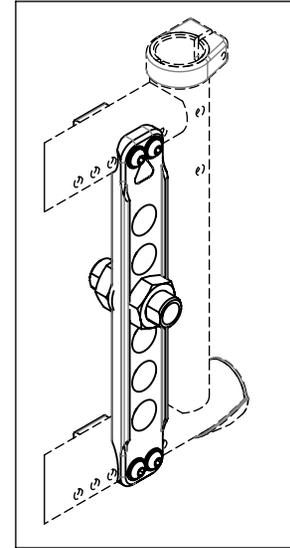


9002396A-00  
 MOUNTING PLATE - T5,  
 3° CAMBER ANGLE

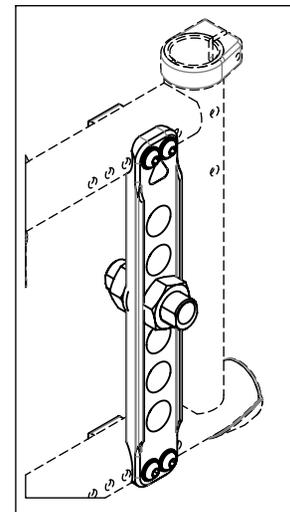


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9002444A 9002445A**  
**ESSIEU - RECEPTACLE & QUINCAILLERIE**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                  | 9002444 | 9002445 |
|----------|-------------|------------------------------|---------|---------|
| 1        | 0021041B-00 | RECEPTACLE ESSIEUX 0 DEG V2B | 1       | -       |
| 2        | 0021042B-00 | RECEPTACLE ESSIEUX 3 DEG V2B | -       | 1       |
| 3        | 0091031A-00 | ÉCROU M18x1                  | 2       | 2       |
| 4        | 0099597A-00 | RONDELLE ÉLASTIQUE M18       | 1       | 1       |

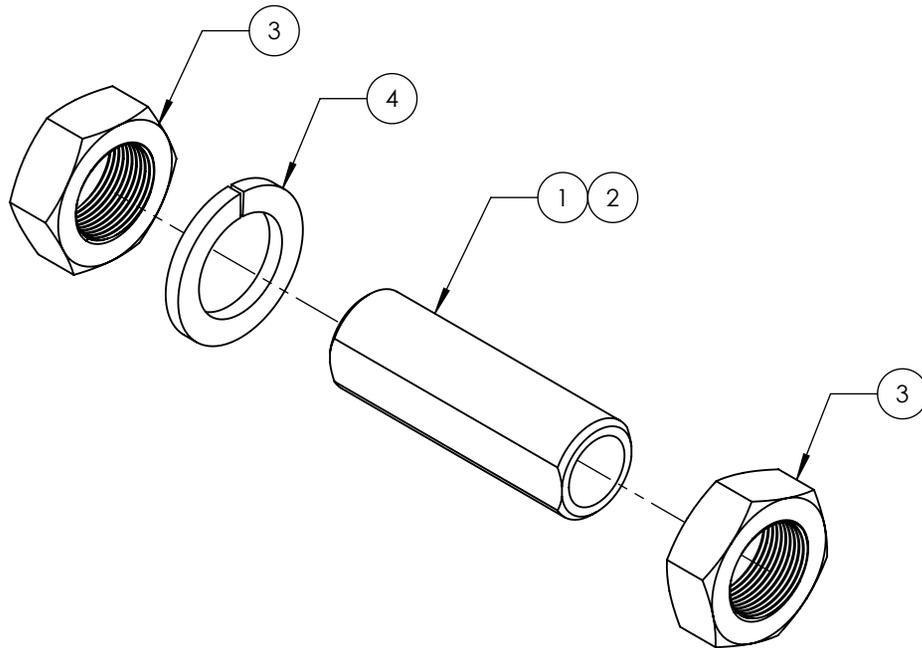

9002444A-00  
 ESSIEU - RECEPTACLE 0°

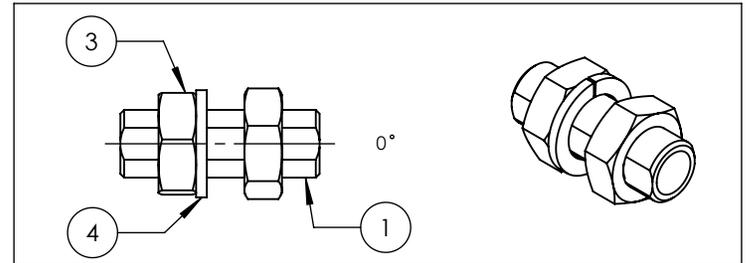

9002445A-00  
 ESSIEU - RECEPTACLE 3°

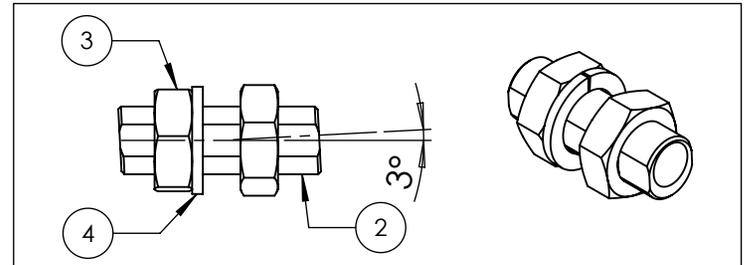


**9002497A & 9002505A 9002510A & 9002519A  
ROUE ARRIÈRE NEWTON & PNEU HP**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                         | 9002497 | 9002505 | 9002506 | 9002507 | 9002508 | 9002509 | 9002510 | 9002519 |
|----------|-------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1        | 0021118A-00 | ROUE NEWTON ONE 20po                | 1       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 2        | 0021110B-00 | ROUE NEWTON ONE 22po                | -       | 1       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 3        | 0021111B-00 | ROUE NEWTON ONE 24po                | -       | -       | 1       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 4        | 0021113A-00 | ROUE NEWTON GRAVITY 20po            | -       | -       | -       | 1       | -       | -       | -       | -       |
| 5        | 0021114A-00 | ROUE NEWTON GRAVITY 22po            | -       | -       | -       | -       | 1       | -       | -       | -       |
| 6        | 0021115B-00 | ROUE NEWTON GRAVITY 24po            | -       | -       | -       | -       | -       | 1       | -       | -       |
| 7        | 0021116A-00 | ROUE NEWTON GRAVITY 25po            | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1       |
| 8        | 0021117A-00 | ROUE NEWTON GRAVITY 26po            | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1       | -       |
| 9        | 0021064A-00 | FOND DE JANTE 20po                  | 1       | -       | -       | 1       | -       | -       | -       | -       |
| 10       | 0021065A-00 | FOND DE JANTE 22po                  | -       | 1       | -       | -       | 1       | -       | -       | -       |
| 11       | 0021066A-00 | FOND DE JANTE 24po                  | -       | -       | 1       | -       | -       | 1       | -       | -       |
| 12       | 0021067A-00 | FOND DE JANTE 25po                  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1       |
| 13       | 0021068A-00 | FOND DE JANTE 26po                  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1       | -       |
| 14       | 0021250A-00 | CHAMBRE À AIR SCHRADER 20x1po       | 1       | -       | -       | 1       | -       | -       | -       | -       |
| 15       | 0021251A-00 | CHAMBRE À AIR SCHRADER 22x1po       | -       | 1       | -       | -       | 1       | -       | -       | -       |
| 16       | 0021252A-00 | CHAMBRE À AIR SCHRADER 24x1po       | -       | -       | 1       | -       | -       | 1       | -       | -       |
| 17       | 0021253A-00 | CHAMBRE À AIR SCHRADER 25x1po       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1       |
| 18       | 0021254A-00 | CHAMBRE À AIR SCHRADER 26x1po       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1       | -       |
| 19       | 0021305A-00 | PNEUS HP RIGHTRUN 20x1po            | 1       | -       | -       | 1       | -       | -       | -       | -       |
| 20       | 0021306A-00 | PNEUS HP RIGHTRUN 22x1po            | -       | 1       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 21       | 0021301B-00 | PNEUS HP 22x1po                     | -       | -       | -       | -       | 1       | -       | -       | -       |
| 22       | 0021307A-00 | PNEUS HP RIGHTRUN 24x1po            | -       | -       | 1       | -       | -       | 1       | -       | -       |
| 23       | 0021308A-00 | PNEUS HP RIGHTRUN 25x1po            | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1       |
| 24       | 0021309A-00 | PNEUS HP RIGHTRUN 26x1po            | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1       | -       |
| 25       | 9001559A-00 | QUINCAILLERIE - CERCEAU, NEWTON ONE | 1       | 1       | 1       | -       | -       | -       | -       | -       |

**ENSEMBLE DE QUINCAILLERIE (#9001559A-00) EST  
INCLUS DANS TOUTES LES ROUES NEWTON ONE**


**NEWTON ONE**

9002497, 9002505 & 9002506

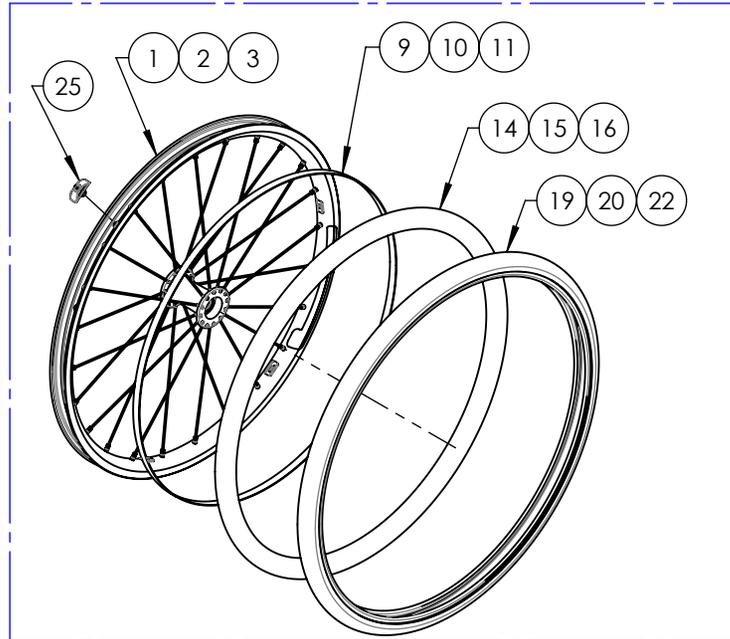

**NEWTON GRAVITY**

9002507, 9002508, 9002509 & 9002510

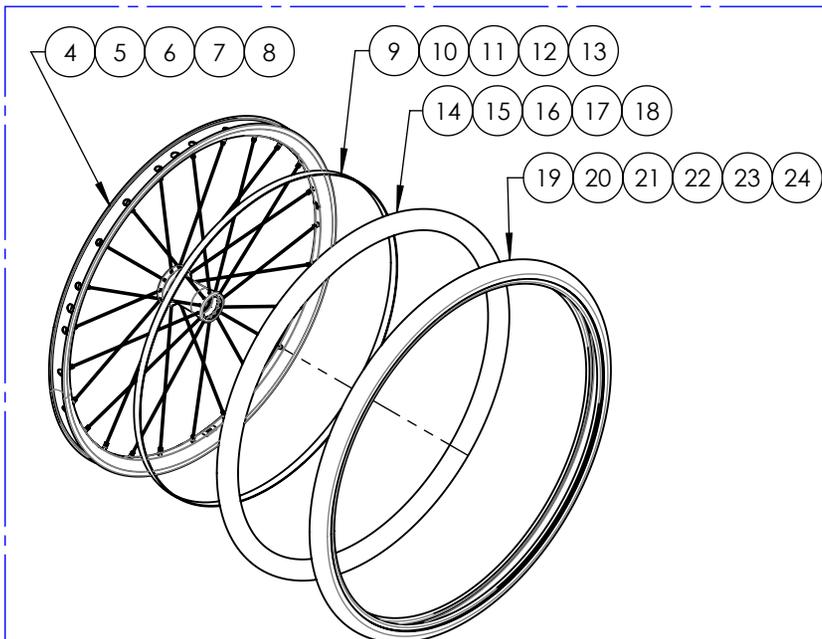

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


**9002498A & 9002511A 9002516A & 9002520A  
ROUE ARRIÈRE NEWTON & PNEU PRESSION STANDARD**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                  | 9002498 | 9002511 | 9002512 | 9002513 | 9002514 | 9002515 | 9002516 | 9002520 |
|----------|-------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1        | 0021118A-00 | ROUE NEWTON ONE 20po                         | 1       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 2        | 0021110B-00 | ROUE NEWTON ONE 22po                         | -       | 1       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 3        | 0021111B-00 | ROUE NEWTON ONE 24po                         | -       | -       | 1       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 4        | 0021113A-00 | ROUE NEWTON GRAVITY 20po                     | -       | -       | -       | 1       | -       | -       | -       | -       |
| 5        | 0021114A-00 | ROUE NEWTON GRAVITY 22po                     | -       | -       | -       | -       | 1       | -       | -       | -       |
| 6        | 0021115B-00 | ROUE NEWTON GRAVITY 24po                     | -       | -       | -       | -       | -       | 1       | -       | -       |
| 7        | 0021116A-00 | ROUE NEWTON GRAVITY 25po                     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1       |
| 8        | 0021117A-00 | ROUE NEWTON GRAVITY 26po                     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1       | -       |
| 9        | 0021064A-00 | FOND DE JANTE 20po                           | 1       | -       | -       | 1       | -       | -       | -       | -       |
| 10       | 0021065A-00 | FOND DE JANTE 22po                           | -       | 1       | -       | -       | 1       | -       | -       | -       |
| 11       | 0021066A-00 | FOND DE JANTE 24po                           | -       | -       | 1       | -       | -       | 1       | -       | -       |
| 12       | 0021067A-00 | FOND DE JANTE 25po                           | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1       |
| 13       | 0021068A-00 | FOND DE JANTE 26po                           | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1       | -       |
| 14       | 0021255A-00 | CHAMBRE À AIR SCHRADER 20x1 $\frac{3}{8}$ po | 1       | -       | -       | 1       | -       | -       | -       | -       |
| 15       | 0021256A-00 | CHAMBRE À AIR SCHRADER 22x1 $\frac{3}{8}$ po | -       | 1       | -       | -       | 1       | -       | -       | -       |
| 16       | 0021257A-00 | CHAMBRE À AIR SCHRADER 24x1 $\frac{3}{8}$ po | -       | -       | 1       | -       | -       | 1       | -       | -       |
| 17       | 0021253A-00 | CHAMBRE À AIR SCHRADER 25x1 po               | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1       |
| 18       | 0021259A-00 | CHAMBRE À AIR SCHRADER 26x1 $\frac{3}{8}$ po | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1       | -       |
| 19       | 0021315A-00 | PNEUS PNEUMATIQUE 20x1-3/8po                 | 1       | -       | -       | 1       | -       | -       | -       | -       |
| 20       | 0021316A-00 | PNEUS PNEUMATIQUE 22x1-3/8po                 | -       | 1       | -       | -       | 1       | -       | -       | -       |
| 21       | 0021317A-00 | PNEUS PNEUMATIQUE 24x1-3/8po                 | -       | -       | 1       | -       | -       | 1       | -       | -       |
| 22       | 0021318A-00 | PNEUS PNEUMATIQUE 25x1-3/8po                 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1       |
| 23       | 0021319A-00 | PNEUS PNEUMATIQUE 26x1-3/8po                 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1       | -       |
| 24       | 9001559A-00 | QUINCAILLERIE - CERCEAU, NEWTON ONE          | 1       | 1       | 1       | -       | -       | -       | -       | -       |

**ENSEMBLE DE QUINCAILLERIE (#9001559A-00) EST  
INCLUS DANS TOUTES LES ROUES NEWTON ONE**


**NEWTON ONE**

9002498, 9002511 & 9002512

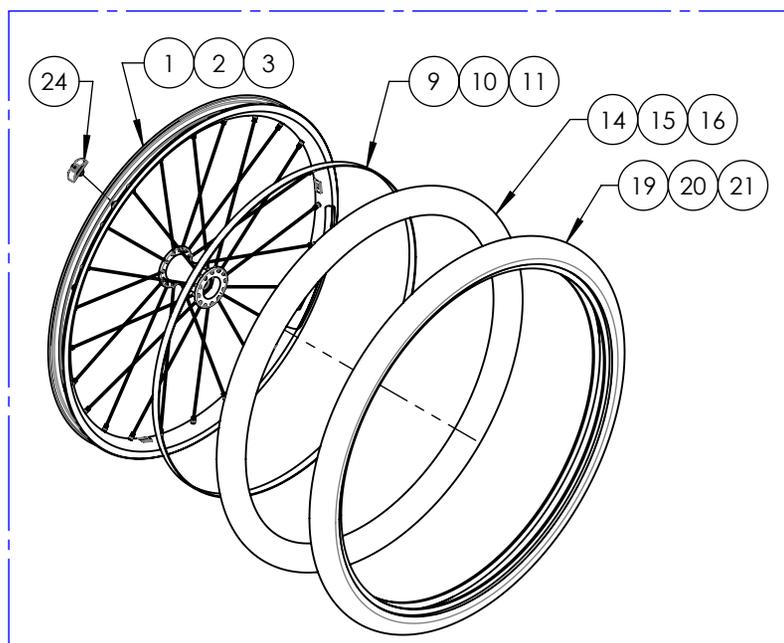

**NEWTON GRAVITY**


9002513, 9002514, 9002515, 9002520 & 9002516

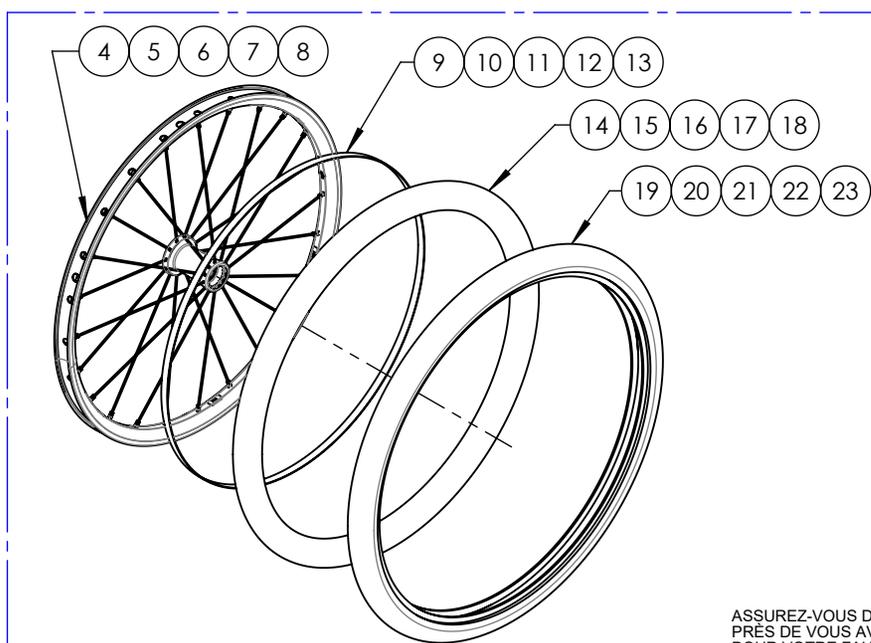

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


**9002896A 9002897A**  
**ESSIEUX POUR ROUES SPINERGY SPOX & LX**

9002896A-00 -  
 ESSIEU - À DÉGAGEMENT RAPIDE, POUR ROUE SPINERGY

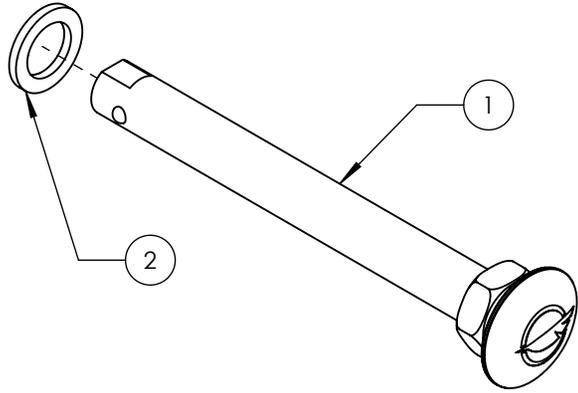

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                 | 9002896 |
|----------|-------------|-----------------------------|---------|
| 1        | 0021014A-00 | ESSIEUX À DÉGAGEMENT RAPIDE | 1       |
| 2        | 0099563A-00 | RONDELLE M12                | 1       |

9002897A-00 -  
 ESSIEU - POUR QUADRAPLÉGIQUE, POUR ROUE SPINERGY



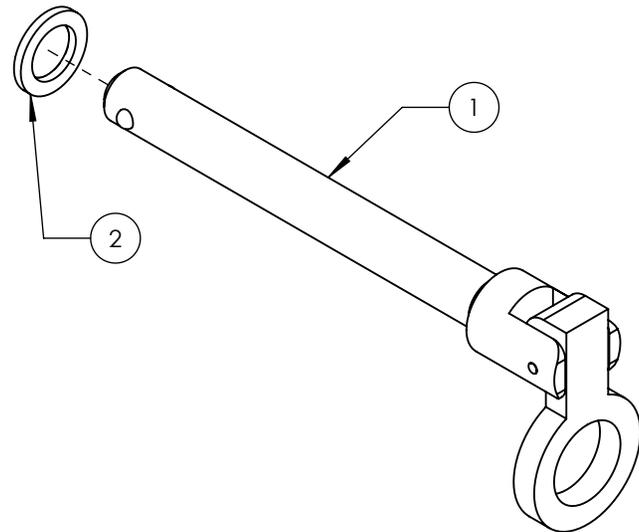


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                      | 9002897 |
|----------|-------------|----------------------------------|---------|
| 1        | 0021015A-00 | ESSIEUX À DÉGAGEMENT RAPIDE QUAD | 1       |
| 2        | 0099563A-00 | RONDELLE M12                     | 1       |

**9010435A**  
**OAD - T2, NEWTON ONE 24po, CERC. ANOD**

**INCOMPATIBLE AVEC L'OPTION HD**  
**(265lb / 120kg MAX)**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                               | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|----------|-------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1        | 0021560A-00 | ROUE NEWTON ONE 24po OAD - ASSY           | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 2        | 0021533A-00 | MONTAGE T2 COTE MENE OAD                  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 3        | 0001249A-00 | ARBRE DE TRANSMISSION EXTENSIBLE OAD 12po | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 4        | 0001249A-01 | ARBRE DE TRANSMISSION EXTENSIBLE OAD 13po | -  | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 5        | 0001249A-02 | ARBRE DE TRANSMISSION EXTENSIBLE OAD 14po | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 6        | 0001249A-03 | ARBRE DE TRANSMISSION EXTENSIBLE OAD 15po | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 7        | 0001249A-04 | ARBRE DE TRANSMISSION EXTENSIBLE OAD 16po | -  | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -  |
| 8        | 0001249A-05 | ARBRE DE TRANSMISSION EXTENSIBLE OAD 17po | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  |
| 9        | 0001249A-06 | ARBRE DE TRANSMISSION EXTENSIBLE OAD 18po | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | -  | -  |
| 10       | 0001249A-07 | ARBRE DE TRANSMISSION EXTENSIBLE OAD 19po | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | -  |
| 11       | 0001249A-08 | ARBRE DE TRANSMISSION EXTENSIBLE OAD 20po | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  |
| 12       | 0001251A-00 | MONTAGE T2 COTE MENANT OAD                | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 13       | 0021557A-00 | CERCEAUX OAD ROUE 24po - ASSY             | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 14       | 0090650A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M5x0.8x25mm L             | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 15       | 0021205A-00 | CERCEAUX ALUMINIUM 22po / ROUE PLASTIQUE  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 16       | 0021111B-00 | ROUE NEWTON ONE 24po                      | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |

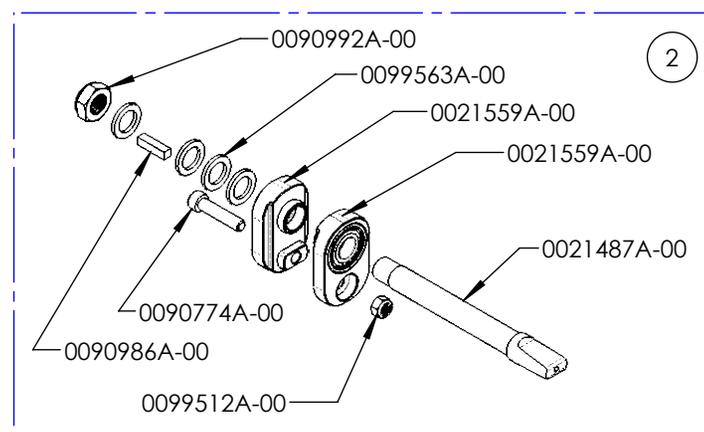
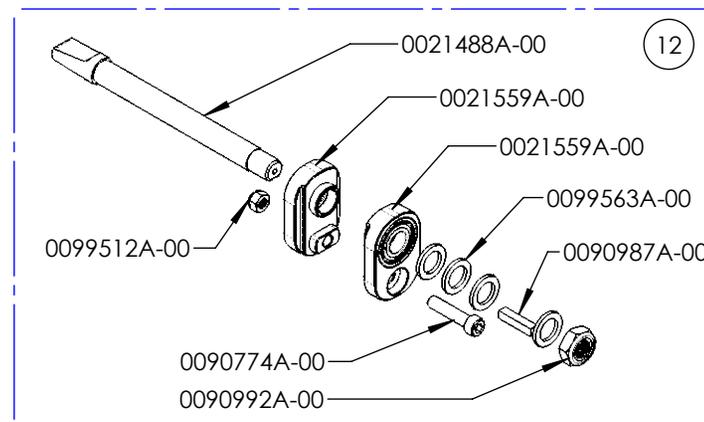
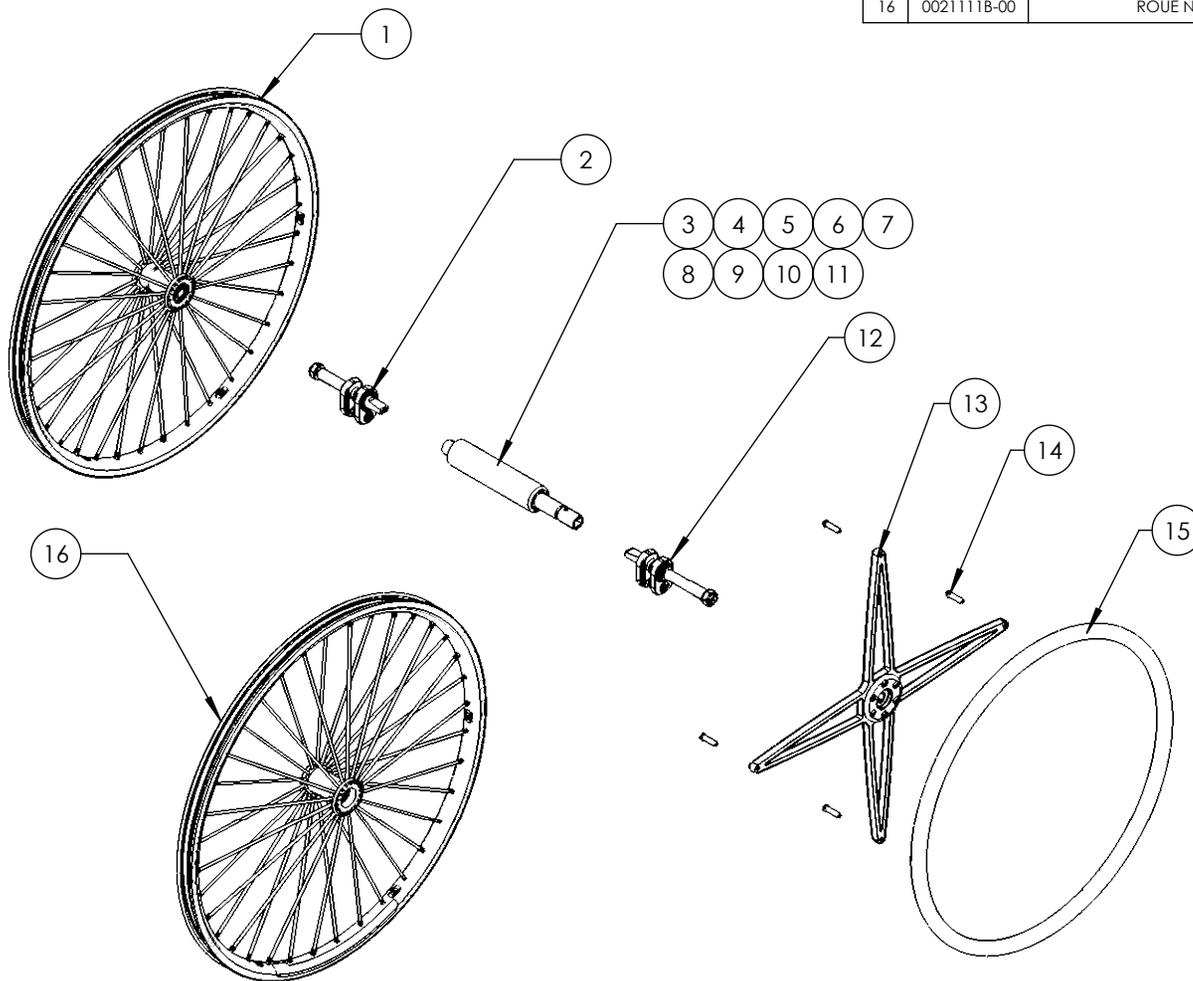


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9010483A**  
**OAD - T2, NEWTON ONE 24po, CERC. PLAST**

**INCOMPATIBLE AVEC L'OPTION HD**  
**(265lb / 120kg MAX)**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                               | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|----------|-------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1        | 0021560A-00 | ROUE NEWTON ONE 24po OAD - ASSY           | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 2        | 0021533A-00 | MONTAGE T2 COTE MENE OAD                  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 3        | 0001249A-00 | ARBRE DE TRANSMISSION EXTENSIBLE OAD 12po | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 4        | 0001249A-01 | ARBRE DE TRANSMISSION EXTENSIBLE OAD 13po | -  | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 5        | 0001249A-02 | ARBRE DE TRANSMISSION EXTENSIBLE OAD 14po | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 6        | 0001249A-03 | ARBRE DE TRANSMISSION EXTENSIBLE OAD 15po | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 7        | 0001249A-04 | ARBRE DE TRANSMISSION EXTENSIBLE OAD 16po | -  | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -  |
| 8        | 0001249A-05 | ARBRE DE TRANSMISSION EXTENSIBLE OAD 17po | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  |
| 9        | 0001249A-06 | ARBRE DE TRANSMISSION EXTENSIBLE OAD 18po | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | -  | -  |
| 10       | 0001249A-07 | ARBRE DE TRANSMISSION EXTENSIBLE OAD 19po | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | -  |
| 11       | 0001249A-08 | ARBRE DE TRANSMISSION EXTENSIBLE OAD 20po | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  |
| 12       | 0001251A-00 | MONTAGE T2 COTE MENANT OAD                | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 13       | 0090650A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M5x0.8x25mm L             | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 14       | 0021557A-00 | CERCEAUX OAD ROUE 24po - ASSY             | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 15       | 0021207A-00 | CERCEAUX PLASTIFIÉS 22po - ROUE PLASTIQUE | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 16       | 0021111B-00 | ROUE NEWTON ONE 24po                      | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |

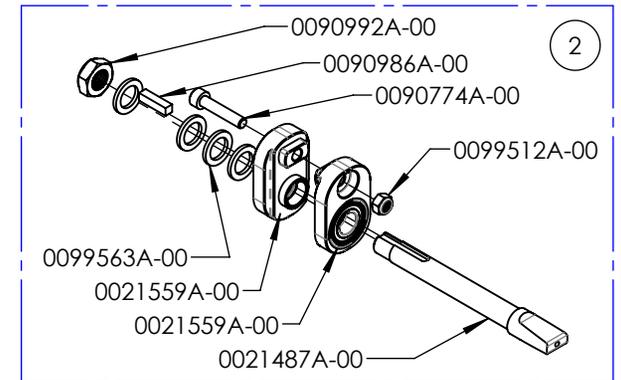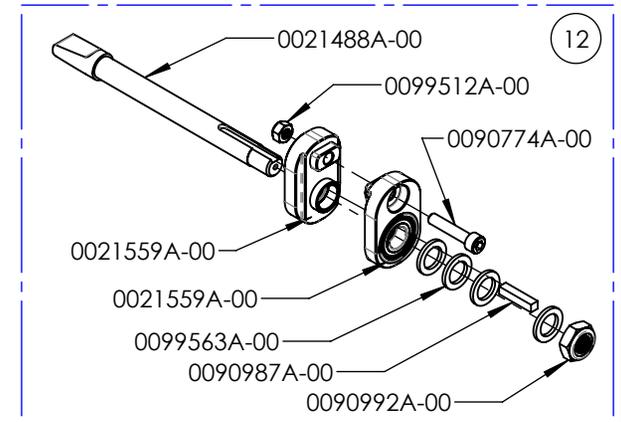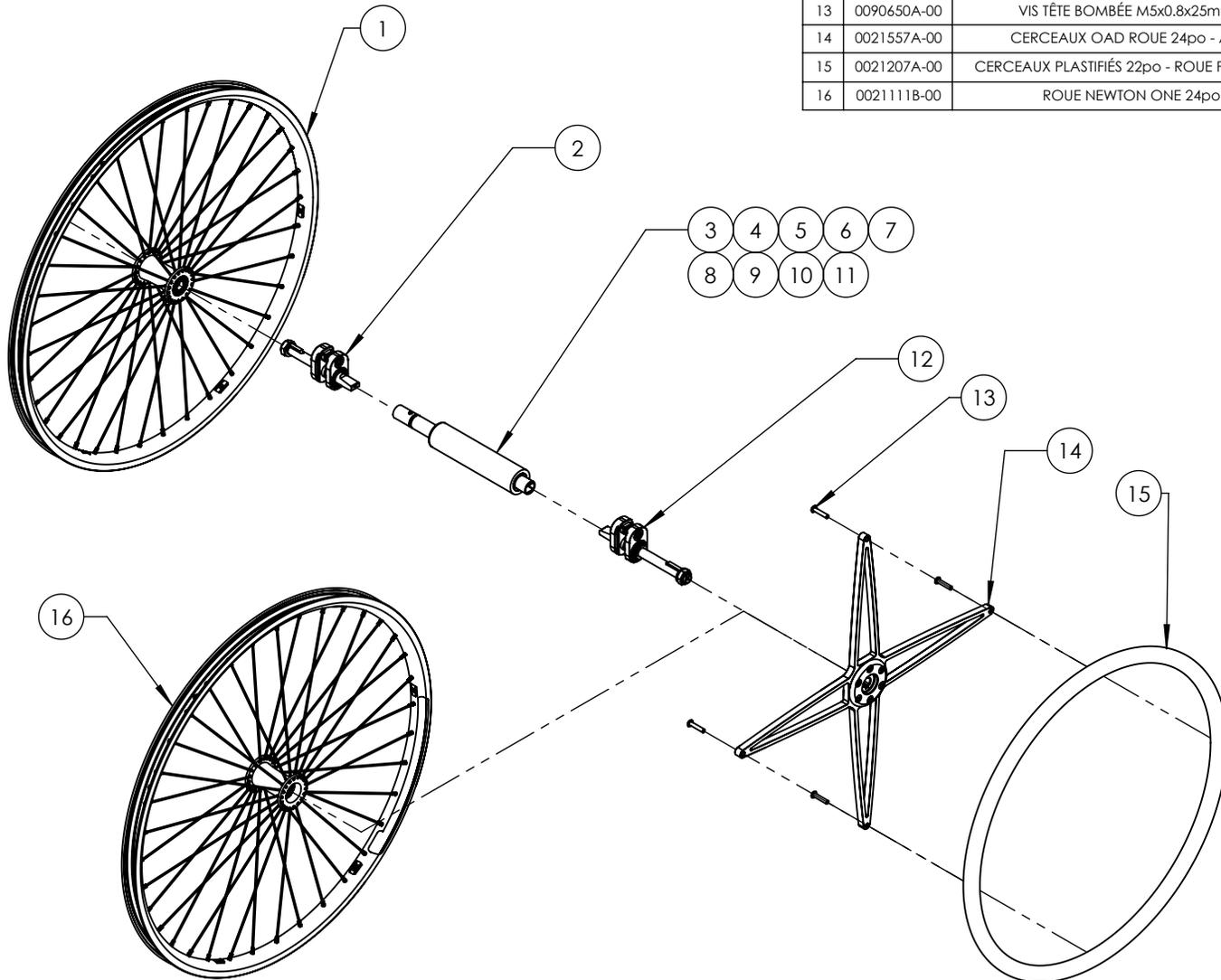

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue roue arrière**  
**Plaque d'extension pour amputé ajustable pour plaque de montage réversible**



| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                            | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 1        | 9002388B-00 | PLAQUE D'EXTENSION AMPUTÉ - T5, DROITE | 1   |
| 2        | 9002390B-00 | PLAQUE D'EXTENSION AMPUTÉ - T5, GAUCHE | 1   |
| 3        | 9002444A-00 | ESSIEU - RECEPTACLE 0°                 | 1   |
| 4        | 9002445A-00 | ESSIEU - RECEPTACLE 3°                 | 1   |

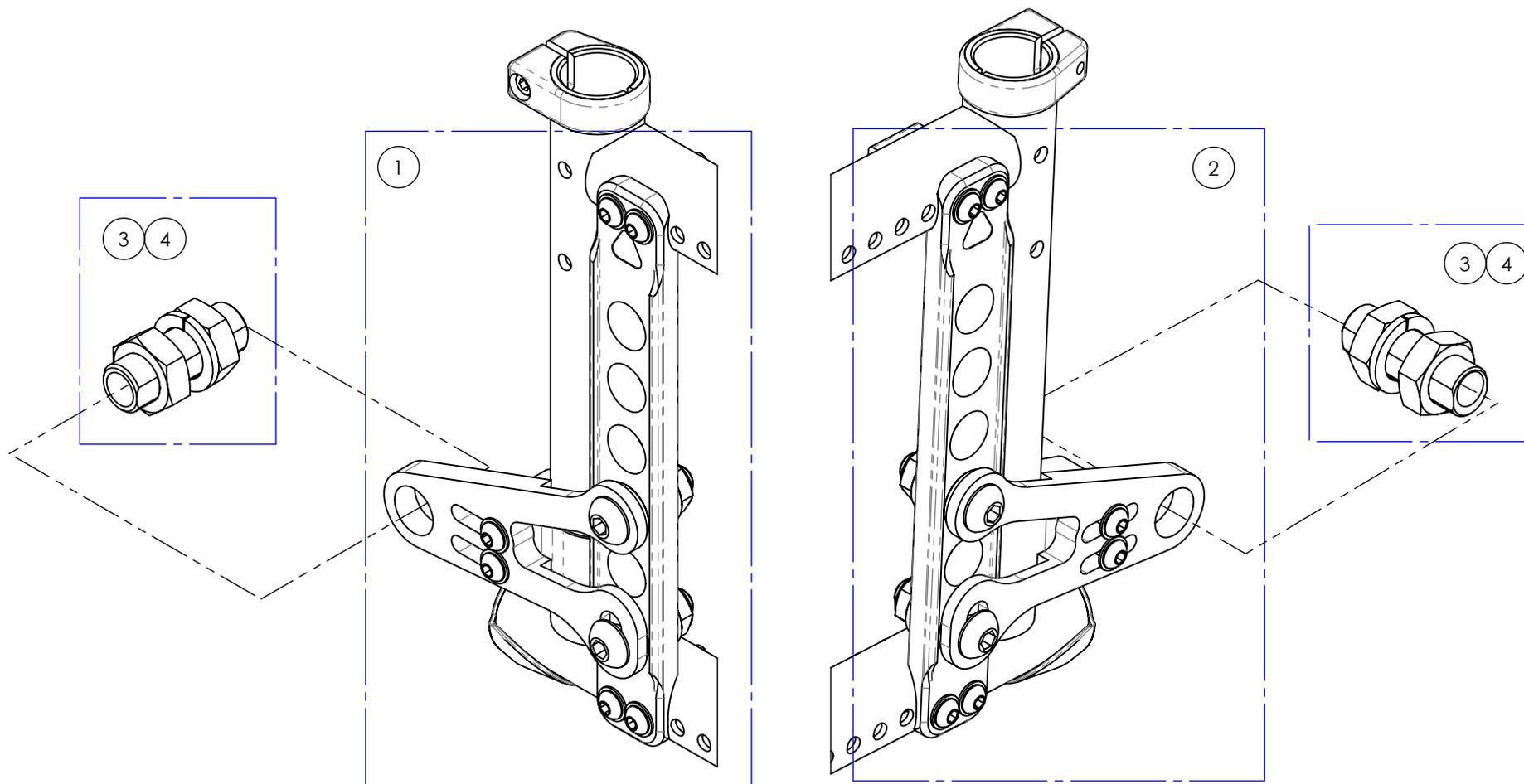

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue de roues arrière**  
**Plaque de montage de roue arrière réversible à 12 positions**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                         | QTÉ |
|----------|-------------|-------------------------------------|-----|
| 1        | 9002395B-00 | PLAQUE MONTAGE - T5, INCLINAISON 0° | 1   |
| 2        | 9002396B-00 | PLAQUE MONTAGE - T5, INCLINAISON 3° | 1   |

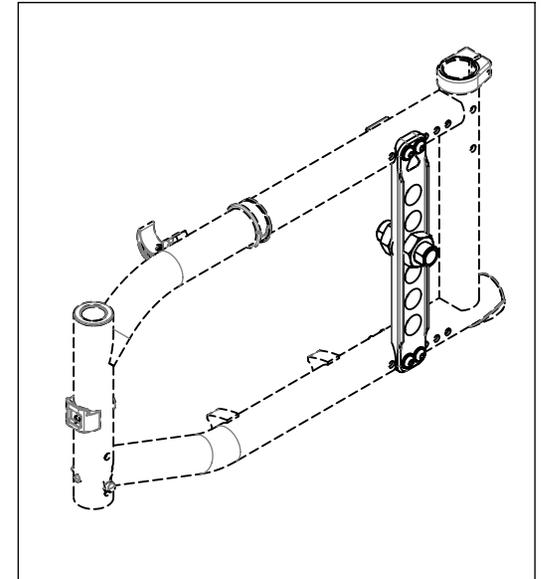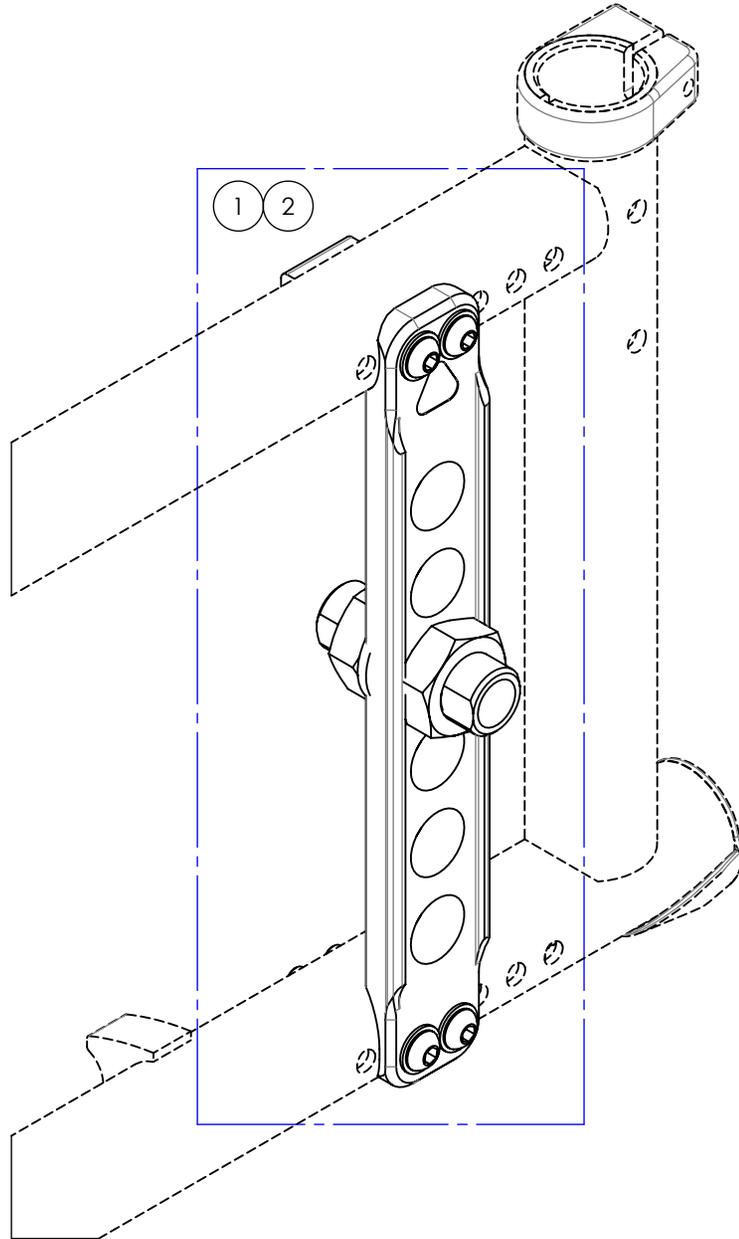

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue de roues arrière**  
**Insert anti-crevaison pour pneumatiques 1 3/8 po**

| No. ITEM | No. PIÈCE          | DESCRIPTION  | QTÉ |
|----------|--------------------|--|-----|
| 1        | <b>9002409A-00</b> | <b>INSERT ANTI-CREVAISON &amp; PNEUMATIQUE 1 3/8po, 22po</b> | 1   |
|          | 0021371A-00        | INSERT ANTI-CREVAISON 22x1 3/8po                             | 1   |
|          | 0021316A-00        | PNEUS PNEUMATIQUE 22x1-3/8po                                 | 1   |
| 2        | <b>9002410A-00</b> | <b>INSERT ANTI-CREVAISON &amp; PNEUMATIQUE 1 3/8po, 24po</b> | 1   |
|          | 0021372A-00        | INSERT ANTI-CREVAISON 24x1 3/8po                             | 1   |
|          | 0021317A-00        | PNEUS PNEUMATIQUE 24x1-3/8po                                 | 1   |
| 3        | <b>9002412A-00</b> | <b>INSERT ANTI-CREVAISON &amp; PNEUMATIQUE 1 3/8po, 26po</b> | 1   |
|          | 0005466A-00        | INSERT ANTI-CREVAISON 26x1 3/8po                             | 1   |
|          | 0021319A-00        | PNEUS PNEUMATIQUE 26x1-3/8po                                 | 1   |

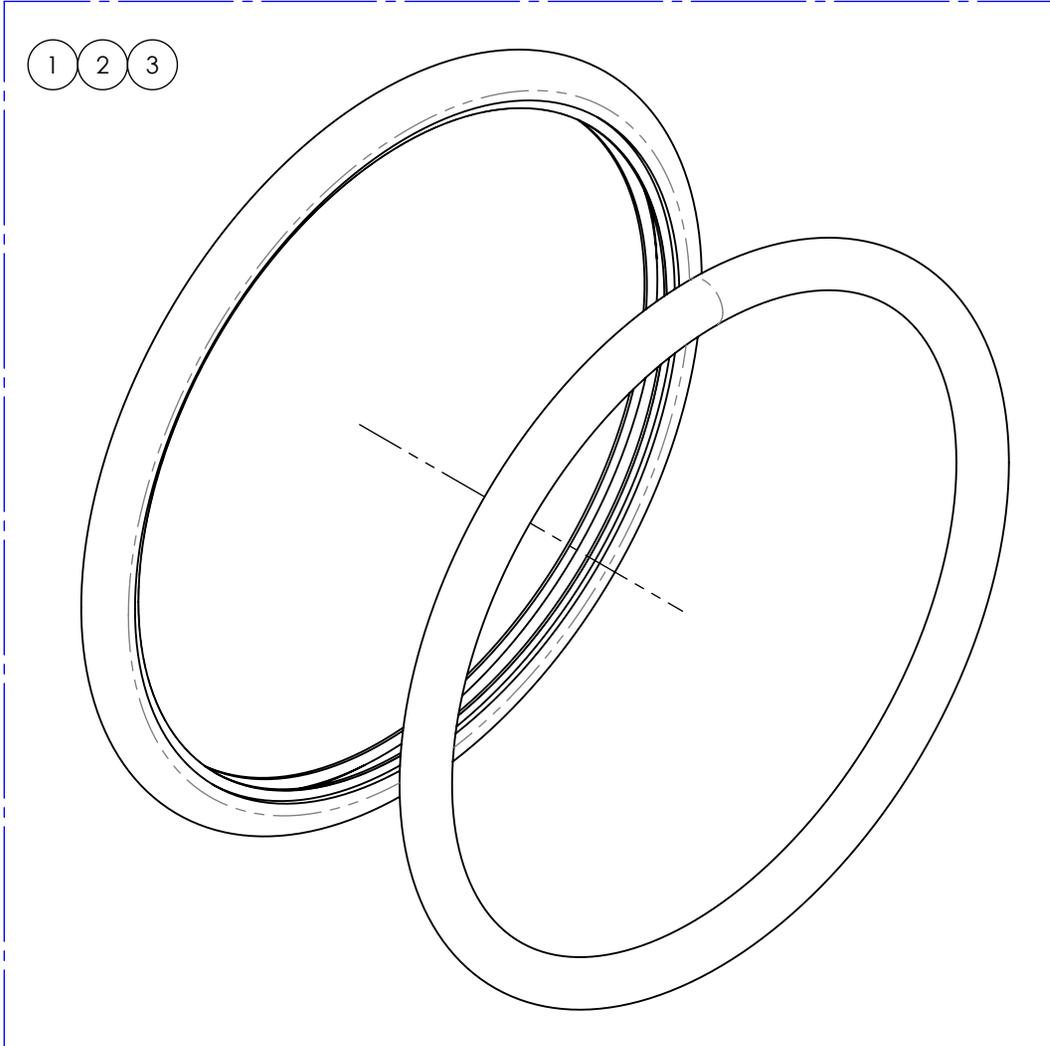


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

## Catalogue de roues arrière Cerceaux de conduite Newton Air Grip



| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                       | QTÉ |
|----------|-------------|---|-----|
| 1        | 0021429A-00 | CERCEAUX NEWTON AIR GRIP 20po NOIR                | 1   |
| 2        | 0021430A-00 | CERCEAUX NEWTON AIR GRIP 22po NOIR                | 1   |
| 3        | 0021431A-00 | CERCEAUX NEWTON AIR GRIP 24po NOIR                | 1   |
| 4        | 0021432A-00 | CERCEAUX NEWTON AIR GRIP 25po NOIR                | 1   |
| 5        | 0021433A-00 | CERCEAUX NEWTON AIR GRIP 26po NOIR                | 1   |
| 6        | 9002967A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 20po, ORANGE TANGERINE | 1   |
| 7        | 9002968A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 22po, ORANGE TANGERINE | 1   |
| 8        | 9002969A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 24po, ORANGE TANGERINE | 1   |
| 9        | 9002970A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 25po, ORANGE TANGERINE | 1   |
| 10       | 9002971A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 26po, ORANGE TANGERINE | 1   |
| 11       | 9002972A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 20po, BLEU ACIER       | 1   |
| 12       | 9002973A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 22po, BLEU ACIER       | 1   |
| 13       | 9002974A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 24po, BLEU ACIER       | 1   |
| 14       | 9002975A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 25po, BLEU ACIER       | 1   |
| 15       | 9002976A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 26po, BLEU ACIER       | 1   |
| 16       | 9002977A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 20po, BLEU CIEL        | 1   |
| 17       | 9002978A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 22po, BLEU CIEL        | 1   |
| 18       | 9002979A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 24po, BLEU CIEL        | 1   |
| 19       | 9002980A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 25po, BLEU CIEL        | 1   |
| 20       | 9002981A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 26po, BLEU CIEL        | 1   |

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                    | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 21       | 9002982A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 20po, ANTHRACITE    | 1   |
| 22       | 9002983A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 22po, ANTHRACITE    | 1   |
| 23       | 9002984A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 24po, ANTHRACITE    | 1   |
| 24       | 9002985A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 25po, ANTHRACITE    | 1   |
| 25       | 9002986A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 26po, ANTHRACITE    | 1   |
| 26       | 9002987A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 20po, ROUGE FERRARI | 1   |
| 27       | 9002988A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 22po, ROUGE FERRARI | 1   |
| 28       | 9002989A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 24po, ROUGE FERRARI | 1   |
| 29       | 9002990A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 25po, ROUGE FERRARI | 1   |
| 30       | 9002991A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 26po, ROUGE FERRARI | 1   |
| 31       | 9002992A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 20po, BLEU SAPHIRE  | 1   |
| 32       | 9002993A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 22po, BLEU SAPHIRE  | 1   |
| 33       | 9002994A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 24po, BLEU SAPHIRE  | 1   |
| 34       | 9002995A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 25po, BLEU SAPHIRE  | 1   |
| 35       | 9002996A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 26po, BLEU SAPHIRE  | 1   |
| 36       | 9002997A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 20po, BLANC         | 1   |
| 37       | 9002998A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 22po, BLANC         | 1   |
| 38       | 9002999A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 24po, BLANC         | 1   |
| 39       | 9003000A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 25po, BLANC         | 1   |
| 40       | 9003001A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 26po, BLANC         | 1   |
| 41       | 9003002A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 20po, BOURGOGNE     | 1   |
| 42       | 9003003A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 22po, BOURGOGNE     | 1   |
| 43       | 9003004A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 24po, BOURGOGNE     | 1   |
| 44       | 9003005A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 25po, BOURGOGNE     | 1   |
| 45       | 9003006A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 26po, BOURGOGNE     | 1   |
| 46       | 9003007A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 20po, VERT MONSTRE  | 1   |
| 47       | 9003008A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 22po, VERT MONSTRE  | 1   |
| 48       | 9003009A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 24po, VERT MONSTRE  | 1   |
| 49       | 9003010A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 25po, VERT MONSTRE  | 1   |
| 50       | 9003011A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 26po, VERT MONSTRE  | 1   |
| 51       | 9003012A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 20po, FUCHSIA       | 1   |
| 52       | 9003013A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 22po, FUCHSIA       | 1   |
| 53       | 9003014A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 24po, FUCHSIA       | 1   |
| 54       | 9003015A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 25po, FUCHSIA       | 1   |
| 55       | 9003016A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 26po, FUCHSIA       | 1   |
| 56       | 9003017A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 20po, VERT ACIDE    | 1   |
| 57       | 9003018A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 22po, VERT ACIDE    | 1   |
| 58       | 9003019A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 24po, VERT ACIDE    | 1   |
| 59       | 9003020A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 25po, VERT ACIDE    | 1   |
| 60       | 9003021A-00 | CERCEAU - NEWTON AIR GRIP, 26po, VERT ACIDE    | 1   |

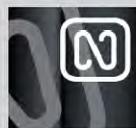

BLACK  
NOIR



SUNKISSED ORANGE  
ORANGE TANGERINE



STEEL BLUE  
BLEU ACIER



SKY BLUE  
BLEU CIEL



CHARCOAL  
ANTHRACITE



FERRARI RED  
ROUGE FERRARI



SAPPHIRE BLUE  
BLEU SAPHIRE



WHITE  
BLANC



BURGUNDY  
BOURGOGNE



MONSTER GREEN  
VERT MONSTRE



FUCHSIA



ACID GREEN  
VERT ACIDE

### COLLANTS POUR CERCEAUX

0051221A-00  
COLLANT DE CONTACT POUR CERCEAUX  
DE PROPULSION

### FRAIS DE COUPE

Disponible seulement pour 20, 24, 25 & 26 po

**9003632A-00**

Découpe languette, assemblage rapprochée



**9003633A-00**

Découpe languette, assemblage très rapprochée



ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue de roues arrière**  
**Quincaillerie pour cerceaux de conduite**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION  | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 1        | 9001559A-00 | QUINCAILLERIE - CERCEAU, NEWTON ONE                | 1   |
| 2        | 9001560A-00 | QUINCAILLERIE - CERCEAU, NEWTON GRAVITY & SPINERGY | 1   |
| 3        | 9001006A-00 | QUINCAILLERIE - CERCEAU, MAG 20po                  | 1   |
| 4        | 9001558A-00 | QUINCAILLERIE - CERCEAU, MAG 22 & 24po             | 1   |
| 5        | 9008110A-00 | QUINCAILLERIE V2 - CERCEAU, MAG 20po               | 1   |
| 6        | 9008111A-00 | QUINCAILLERIE V2 - CERCEAU, MAG 22po               | 1   |
| 7        | 9008112A-00 | QUINCAILLERIE V2 - CERCEAU, MAG 24po               | 1   |


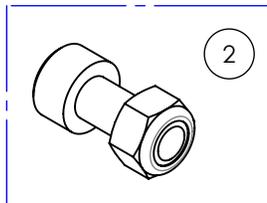
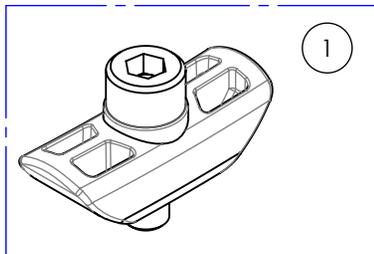


**CHAQUE NUMÉRO D'ITEM EST POUR 1 ROUE COMPLÈTE.**  
**BESOIN D'UNE QTÉ DE 2 POUR LES 2 ROUES**

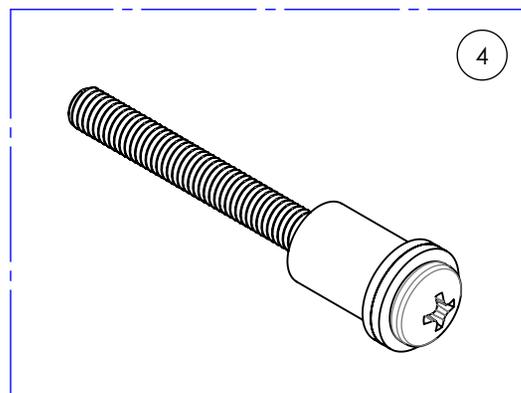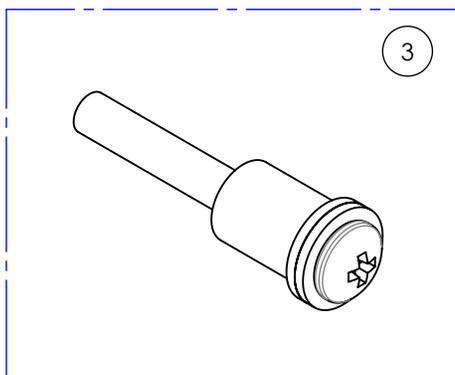


Compatible avec anciennes générations des roues mag

- 0021105A-00 - ROUE PLASTIQUE MOULÉ 20po
- 0021106A-00 - ROUE PLASTIQUE MOULÉ 22po
- 0021107A-00 - ROUE PLASTIQUE MOULÉ 24po

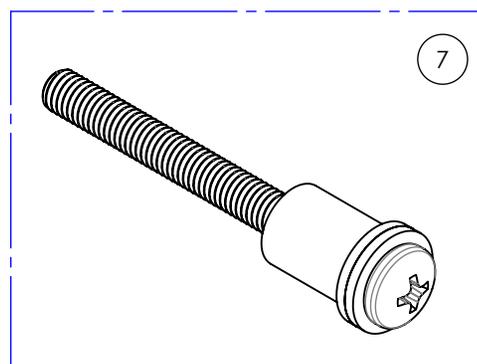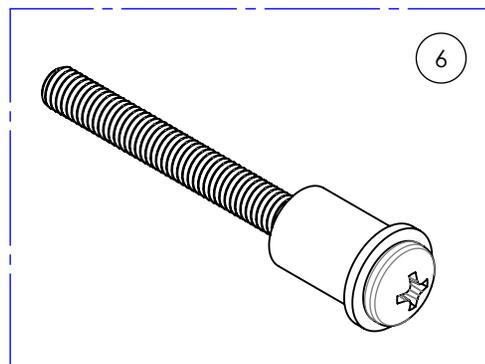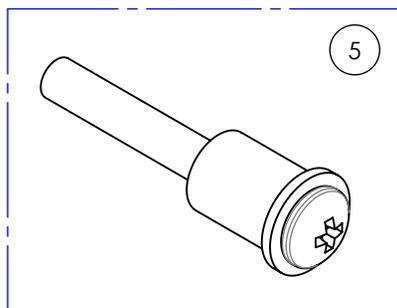

Compatible avec les plus récentes générations des roues mag


## Catalogue de roues arrière Cerceaux Surge & Natural Fit

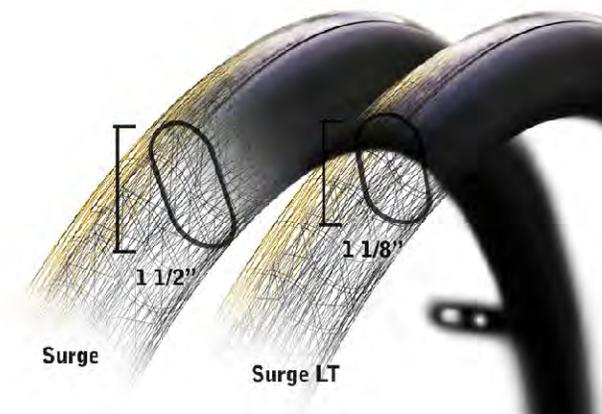

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                               | QTÉ |
|----------|-------------|---|-----|
| 1        | 0021239A-00 | CERCEAUX SURGE 22po                       | 1   |
| 2        | 0021240A-00 | CERCEAUX SURGE 24po                       | 1   |
| 3        | 0021241A-00 | CERCEAUX SURGE 25po                       | 1   |
| 4        | 0021242A-00 | CERCEAUX SURGE 26po                       | 1   |
| 5        | 0021232A-00 | CERCEAUX SURGE LT 22po                    | 1   |
| 6        | 0021233A-00 | CERCEAUX SURGE LT 24po                    | 1   |
| 7        | 0021234A-00 | CERCEAUX SURGE LT 25po                    | 1   |
| 8        | 0021235A-00 | CERCEAUX SURGE LT 26po                    | 1   |
| 9        | 0021221A-00 | CERCEAUX NATURAL FIT 22po                 | 1   |
| 10       | 0021222A-00 | CERCEAUX NATURAL FIT 24po                 | 1   |
| 11       | 0021223A-00 | CERCEAUX NATURAL FIT 25po                 | 1   |
| 12       | 0021224A-00 | CERCEAUX NATURAL FIT 26po                 | 1   |
| 13       | 9001552A-00 | CERCEAU - NATURAL FIT, STD GRIP, 22po     | 1   |
|          | 0021221A-00 | CERCEAUX NATURAL FIT 22po                 | 1   |
|          | 0021226A-00 | PROTÈGE POUCE NATURAL FIT 22po            | 1   |
| 14       | 9001553A-00 | CERCEAU - NATURAL FIT, STD GRIP, 24po     | 1   |
|          | 0021222A-00 | CERCEAUX NATURAL FIT 24po                 | 1   |
|          | 0021227A-00 | PROTÈGE POUCE NATURAL FIT 24po            | 1   |
| 15       | 9002849A-00 | CERCEAU - NATURAL FIT, STD GRIP, 25po     | 1   |
|          | 0021223A-00 | CERCEAUX NATURAL FIT 25po                 | 1   |
|          | 0021228A-00 | PROTÈGE POUCE NATURAL FIT 25po            | 1   |
| 16       | 9001554A-00 | CERCEAU - NATURAL FIT, STD GRIP, 26po     | 1   |
|          | 0021224A-00 | CERCEAUX NATURAL FIT 26po                 | 1   |
|          | 0021229A-00 | PROTÈGE POUCE NATURAL FIT 26po            | 1   |
| 17       | 9003278A-00 | CERCEAU - NATURAL FIT SUPER GRIP, 22po    | 1   |
|          | 0021221A-00 | CERCEAUX NATURAL FIT 22po                 | 1   |
|          | 0021243A-00 | PROTÈGE POUCE SUPER GRIP NATURAL FIT 22po | 1   |
| 18       | 9003279A-00 | CERCEAU - NATURAL FIT SUPER GRIP, 24po    | 1   |
|          | 0021222A-00 | CERCEAUX NATURAL FIT 24po                 | 1   |
|          | 0021244A-00 | PROTÈGE POUCE SUPER GRIP NATURAL FIT 24po | 1   |
| 19       | 9003280A-00 | CERCEAU - NATURAL FIT SUPER GRIP, 25po    | 1   |
|          | 0021223A-00 | CERCEAUX NATURAL FIT 25po                 | 1   |
|          | 0021245A-00 | PROTÈGE POUCE SUPER GRIP NATURAL FIT 25po | 1   |



| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 20       | 9003281A-00 | CERCEAU - NATURAL FIT SUPER GRIP, 26po     | 1   |
|          | 0021224A-00 | CERCEAUX NATURAL FIT 26po                  | 1   |
|          | 0021246A-00 | PROTÈGE POUCE SUPER GRIP NATURAL FIT 26po  | 1   |
| 21       | 0021272A-00 | CERCEAUX NATURAL FIT LT 22po               | 1   |
| 22       | 0021273A-00 | CERCEAUX NATURAL FIT LT 24po               | 1   |
| 23       | 0021274A-00 | CERCEAUX NATURAL FIT LT 25po               | 1   |
| 24       | 0021275A-00 | CERCEAUX NATURAL FIT LT 26po               | 1   |
| 25       | 9003282A-00 | CERCEAU - NATURAL FIT LT STD GRIP, 22po    | 1   |
|          | 0021272A-00 | CERCEAUX NATURAL FIT LT 22po               | 1   |
|          | 0021226A-00 | PROTÈGE POUCE NATURAL FIT 22po             | 1   |
| 26       | 9003283A-00 | CERCEAU - NATURAL FIT LT STD GRIP, 24po    | 1   |
|          | 0021273A-00 | CERCEAUX NATURAL FIT LT 24po               | 1   |
|          | 0021227A-00 | PROTÈGE POUCE NATURAL FIT 24po             | 1   |
| 27       | 9003284A-00 | CERCEAU - NATURAL FIT LT STD GRIP, 25po    | 1   |
|          | 0021274A-00 | CERCEAUX NATURAL FIT LT 25po               | 1   |
|          | 0021228A-00 | PROTÈGE POUCE NATURAL FIT 25po             | 1   |
| 28       | 9003285A-00 | CERCEAU - NATURAL FIT LT STD GRIP, 26po    | 1   |
|          | 0021275A-00 | CERCEAUX NATURAL FIT LT 26po               | 1   |
|          | 0021229A-00 | PROTÈGE POUCE NATURAL FIT 26po             | 1   |
| 29       | 9007803A-00 | CERCEAU - NATURAL FIT LT, SUPER GRIP, 22po | 1   |
|          | 0021243A-00 | PROTÈGE POUCE SUPER GRIP NATURAL FIT 22po  | 1   |
|          | 0021272A-00 | CERCEAUX NATURAL FIT LT 22po               | 1   |
| 30       | 9007804A-00 | CERCEAU - NATURAL FIT LT, SUPER GRIP, 24po | 1   |
|          | 0021244A-00 | PROTÈGE POUCE SUPER GRIP NATURAL FIT 24po  | 1   |
|          | 0021273A-00 | CERCEAUX NATURAL FIT LT 24po               | 1   |
| 31       | 9007805A-00 | CERCEAU - NATURAL FIT LT, SUPER GRIP, 25po | 1   |
|          | 0021245A-00 | PROTÈGE POUCE SUPER GRIP NATURAL FIT 25po  | 1   |
|          | 0021274A-00 | CERCEAUX NATURAL FIT LT 25po               | 1   |
| 32       | 9007806A-00 | CERCEAU - NATURAL FIT LT, SUPER GRIP, 26po | 1   |
|          | 0021246A-00 | PROTÈGE POUCE SUPER GRIP NATURAL FIT 26po  | 1   |
|          | 0021275A-00 | CERCEAUX NATURAL FIT LT 26po               | 1   |

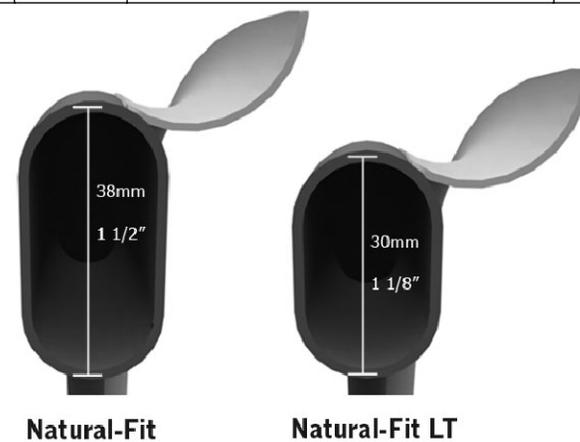

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


**OPTIONS CERCEAUX DE CONDUITE**

Pour cerceaux aluminium seulement (0021200A-00 to 0021204A-00)

1. Assemblage standard (Languette longue)
2. Assemblage rapproché (Languette courte 2 positions)
3. Assemblage très rapproché (Languette courte 1 position)


**COLLANTS POUR CERCEAUX**

9003634A-00

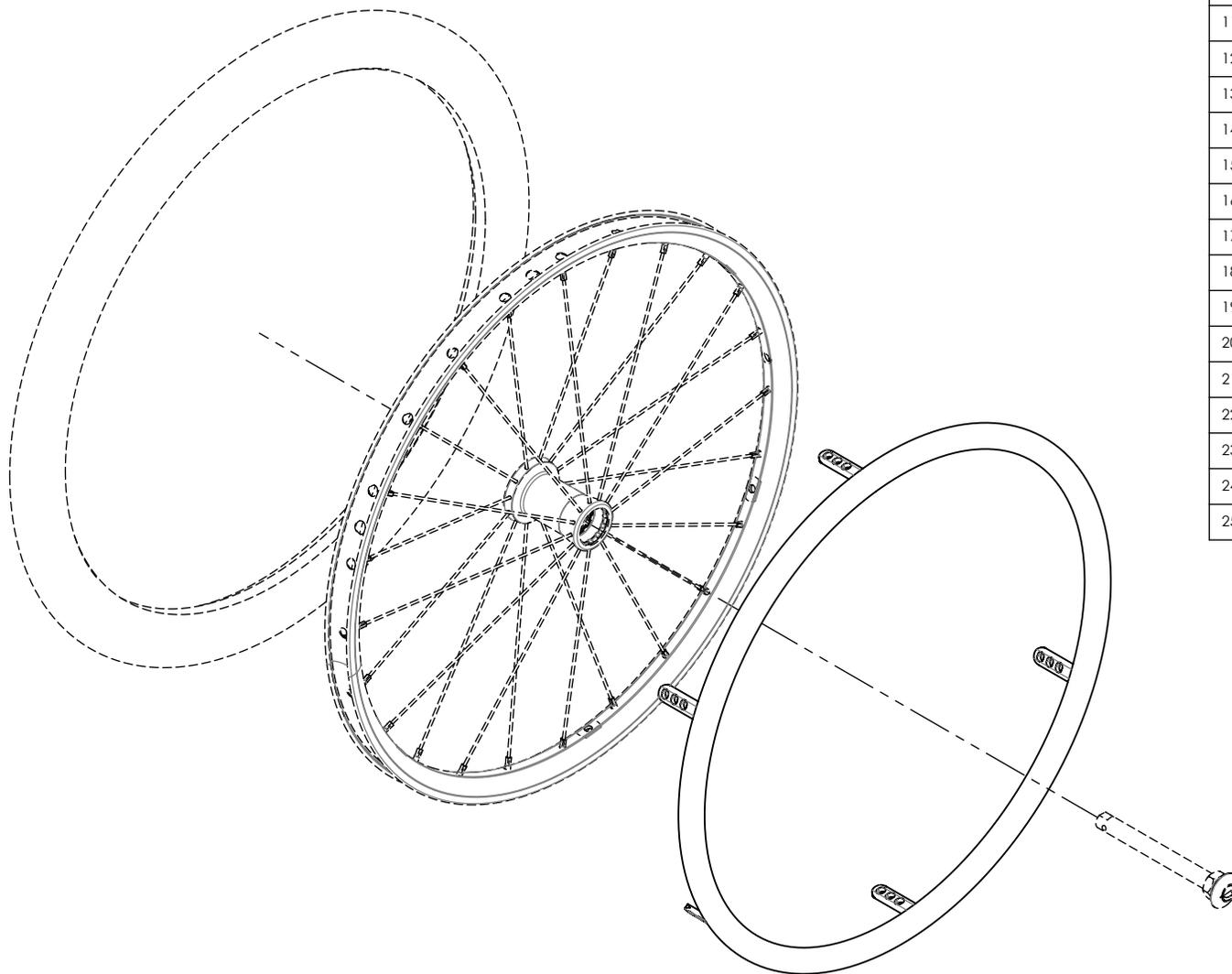


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                               | Qté |
|----------|-------------|---|-----|
| 1        | 0021236A-00 | CERCEAUX ALUMINIUM 20po / ROUE PLASTIQUE  | 1   |
| 2        | 0021205A-00 | CERCEAUX ALUMINIUM 22po / ROUE PLASTIQUE  | 1   |
| 3        | 0021206A-00 | CERCEAUX ALUMINIUM 24po / ROUE PLASTIQUE  | 1   |
| 4        | 0021237A-00 | CERCEAUX PLASTIFIÉS 20po / ROUE PLASTIQUE | 1   |
| 5        | 0021207A-00 | CERCEAUX PLASTIFIÉS 22po - ROUE PLASTIQUE | 1   |
| 6        | 0021208A-00 | CERCEAUX PLASTIFIÉS 24po - ROUE PLASTIQUE | 1   |
| 7        | 0021200A-00 | CERCEAUX ALUMINIUM 20po                   | 1   |
| 8        | 0021201A-00 | CERCEAUX ALUMINIUM 22po                   | 1   |
| 9        | 0021202A-00 | CERCEAUX ALUMINIUM 24po                   | 1   |
| 10       | 0021203A-00 | CERCEAUX ALUMINIUM 25po                   | 1   |
| 11       | 0021204A-00 | CERCEAUX ALUMINIUM 26po                   | 1   |
| 12       | 0021100A-00 | CERCEAUX ALU ANOD. DURE 20po NOIR         | 1   |
| 13       | 0021100A-01 | CERCEAUX ALU ANOD. DURE 22po NOIR         | 1   |
| 14       | 0021100A-02 | CERCEAUX ALU ANOD. DURE 24po NOIR         | 1   |
| 15       | 0021100A-03 | CERCEAUX ALU ANOD. DURE 25po NOIR         | 1   |
| 16       | 0021100A-04 | CERCEAUX ALU ANOD. DURE 26po NOIR         | 1   |
| 17       | 0021210A-00 | CERCEAUX PLASTIFIÉS 20po                  | 1   |
| 18       | 0021211A-00 | CERCEAUX PLASTIFIÉS 22po                  | 1   |
| 19       | 0021212A-00 | CERCEAUX PLASTIFIÉS 24po                  | 1   |
| 20       | 0021213A-00 | CERCEAUX PLASTIFIÉS 25po                  | 1   |
| 21       | 0021214A-00 | CERCEAUX PLASTIFIÉS 26po                  | 1   |
| 22       | 0021216A-00 | CERCEAUX ANTIDÉRAPANTS 22po               | 1   |
| 23       | 0021217A-00 | CERCEAUX ANTIDÉRAPANTS 24po               | 1   |
| 24       | 0021218A-00 | CERCEAUX ANTIDÉRAPANTS 25po               | 1   |
| 25       | 0021219A-00 | CERCEAUX ANTIDÉRAPANTS 26po               | 1   |

## CERCEAU INTÉRIEUR ANODISÉ

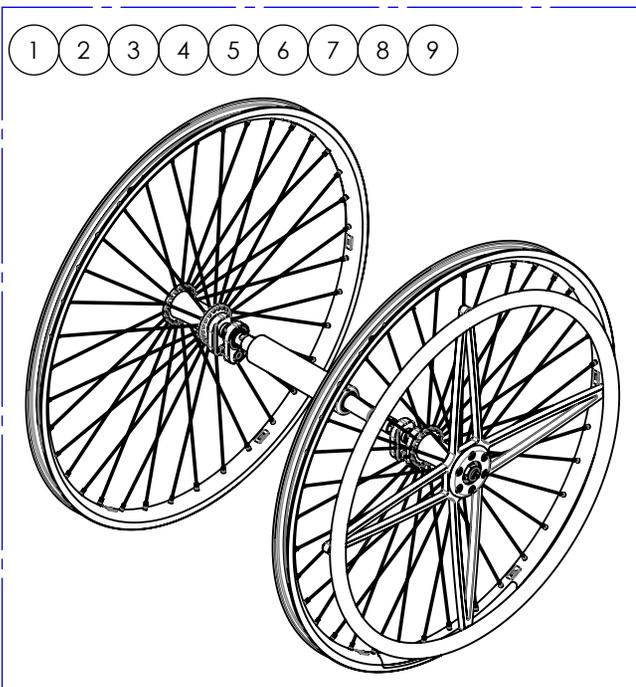


**INCOMPATIBLE AVEC L'OPTION HD**  
**(265lb / 120kg MAX)**

**!!! CERCEAUX EXTÉRIEUR NON INCLUS !!!**  
**VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU CATALOGUE DES CERCEAUX**  
**POUR CHOISIR LE CERCEAU EXTÉRIEUR 24po**

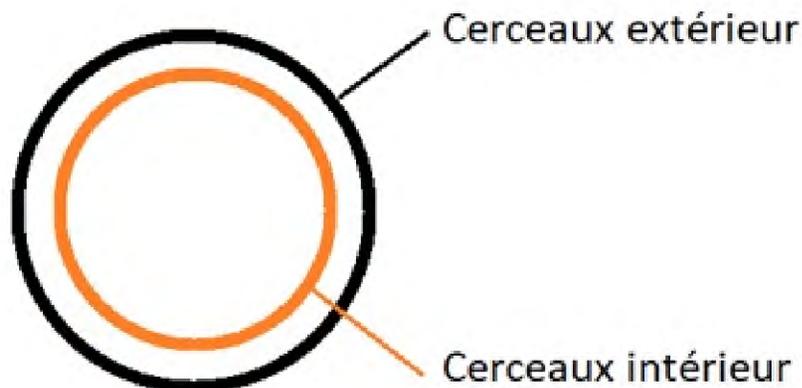




| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                  | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 1        | 9010435A-00 | OAD - T2, NEWTON ONE 24po, CERC. ANOD, 12po  | 1   |
| 2        | 9010483A-00 | OAD - T2, NEWTON ONE 24po, CERC. PLAST, 12po | 1   |
| 3        | 9010435A-01 | OAD - T2, NEWTON ONE 24po, CERC. ANOD, 13po  | 1   |
| 4        | 9010435A-02 | OAD - T2, NEWTON ONE 24po, CERC. ANOD, 14po  | 1   |
| 5        | 9010435A-03 | OAD - T2, NEWTON ONE 24po, CERC. ANOD, 15po  | 1   |
| 6        | 9010435A-04 | OAD - T2, NEWTON ONE 24po, CERC. ANOD, 16po  | 1   |
| 7        | 9010435A-05 | OAD - T2, NEWTON ONE 24po, CERC. ANOD, 17po  | 1   |
| 8        | 9010435A-06 | OAD - T2, NEWTON ONE 24po, CERC. ANOD, 18po  | 1   |
| 9        | 9010435A-07 | OAD - T2, NEWTON ONE 24po, CERC. ANOD, 19po  | 1   |
| 10       | 9010435A-08 | OAD - T2, NEWTON ONE 24po, CERC. ANOD, 20po  | 1   |
| 11       | 9010483A-01 | OAD - T2, NEWTON ONE 24po, CERC. PLAST, 13po | 1   |
| 12       | 9010483A-02 | OAD - T2, NEWTON ONE 24po, CERC. PLAST, 14po | 1   |
| 13       | 9010483A-03 | OAD - T2, NEWTON ONE 24po, CERC. PLAST, 15po | 1   |
| 14       | 9010483A-04 | OAD - T2, NEWTON ONE 24po, CERC. PLAST, 16po | 1   |
| 15       | 9010483A-05 | OAD - T2, NEWTON ONE 24po, CERC. PLAST, 17po | 1   |
| 16       | 9010483A-06 | OAD - T2, NEWTON ONE 24po, CERC. PLAST, 18po | 1   |
| 17       | 9010483A-07 | OAD - T2, NEWTON ONE 24po, CERC. PLAST, 19po | 1   |
| 18       | 9010483A-08 | OAD - T2, NEWTON ONE 24po, CERC. PLAST, 20po | 1   |

## CERCEAU INTÉRIEUR PLASTIFIÉ


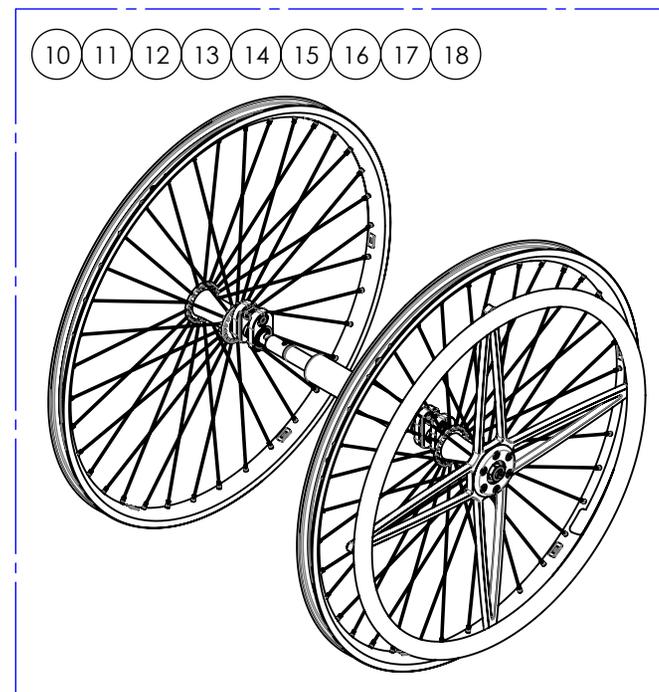


**Catalogue de roues arrière**  
**Essieux à dégagement rapide et permanent**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                      | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 1        | 0021014A-00 | ESSIEUX À DÉGAGEMENT RAPIDE                      | 1   |
| 2        | 0021015A-00 | ESSIEUX À DÉGAGEMENT RAPIDE QUAD                 | 1   |
| 3        | 9002956A-00 | ESSIEU - FILLETÉ                                 | 1   |
| 4        | 9001562A-00 | ESSIEU - FILLETÉ POUR ROUE MAG                   | 1   |
| 5        | 9002896A-00 | ESSIEU - À DÉGAGEMENT RAPIDE, POUR ROUE SPINERGY | 1   |
| 6        | 9002897A-00 | ESSIEU - POUR QUADRAPLÉGIQUE, POUR ROUE SPINERGY | 1   |

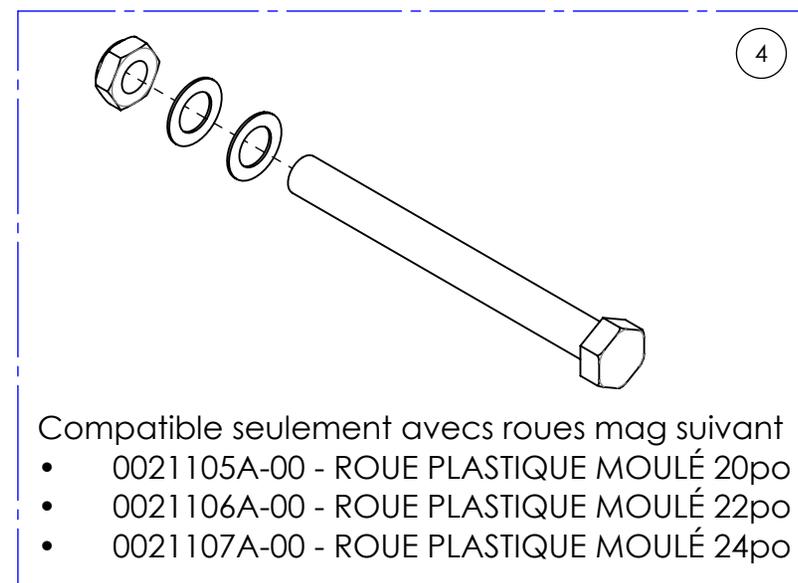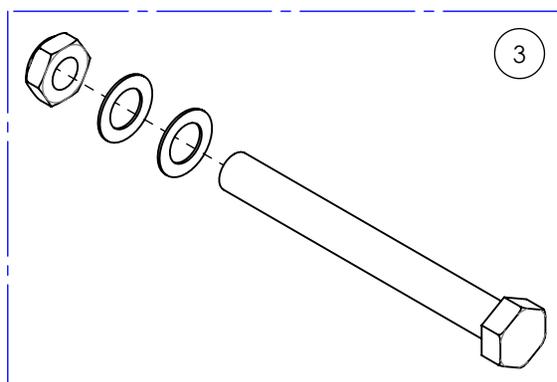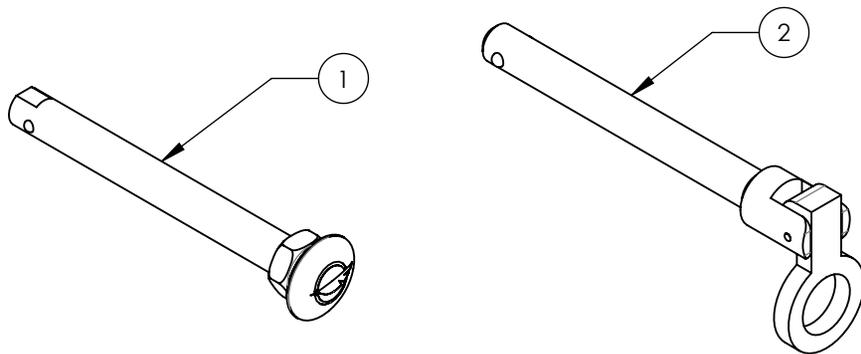

**POUR ROUES SPINERGY SPOX & LX SEULEMENT**

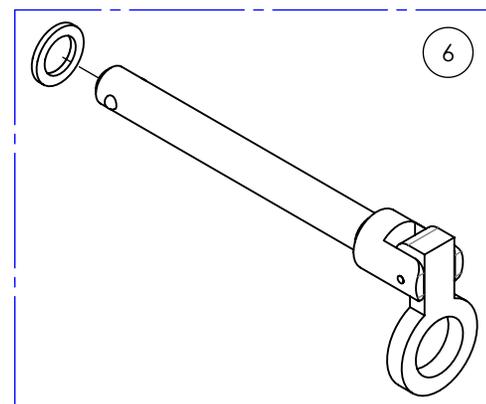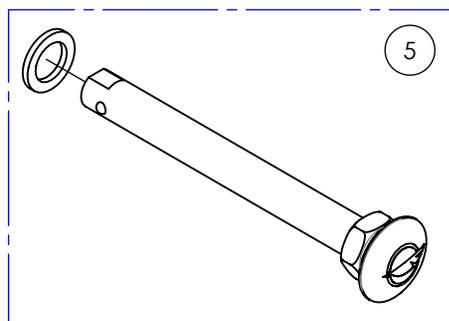



**LX, XLX, SLX, XSLX Replacement Spokes**

| Item#       | Spinergy Part#  | Wheel Size | Color  | Type                 | Assigned wheel   |
|-------------|-----------------|------------|--------|----------------------|--|
| 0021737A-00 | 511005-9.50PUR  | 24in       | PURPLE | PBO spoke, 4mm thick | 24" LX, SLX both sides. 24" XLX, XSLX (X-Laced) inside |
| 0021738A-00 | 511005-9.84BLA  | 25in       | BLACK  | PBO spoke, 4mm thick | 25" LX both sides. 25" XLX (X-Laced) inside            |
| 0021739A-00 | 511005-9.84BLU  | 25in       | BLUE   | PBO spoke, 4mm thick | 25" LX both sides. 25" XLX (X-Laced) inside            |
| 0021740A-00 | 511005-9.84RED  | 25in       | RED    | PBO spoke, 4mm thick | 25" LX both sides. 25" XLX (X-Laced) inside            |
| 0021741A-00 | 511005-9.84YEL  | 25in       | YELLOW | PBO spoke, 4mm thick | 25" LX both sides. 25" XLX (X-Laced) inside            |
| 0021742A-00 | 511005-9.84WHI  | 25in       | WHITE  | PBO spoke, 4mm thick | 25" LX both sides. 25" XLX (X-Laced) inside            |
| 0021743A-00 | 511005-9.84ORA  | 25in       | ORANGE | PBO spoke, 4mm thick | 25" LX both sides. 25" XLX (X-Laced) inside            |
| 0021744A-00 | 511005-9.84GRE  | 25in       | GREEN  | PBO spoke, 4mm thick | 25" LX both sides. 25" XLX (X-Laced) inside            |
| 0021745A-00 | 511005-9.84PNK  | 25in       | PINK   | PBO spoke, 4mm thick | 25" LX both sides. 25" XLX (X-Laced) inside            |
| 0021746A-00 | 511005-9.84PUR  | 25in       | PURPLE | PBO spoke, 4mm thick | 25" LX both sides. 25" XLX (X-Laced) inside            |
| 0021747A-00 | 511005-10.47BLA | 26in       | BLACK  | PBO spoke, 4mm thick | 26" LX both sides. 26" XLX (X-Laced) inside            |
| 0021748A-00 | 511005-10.47BLU | 26in       | BLUE   | PBO spoke, 4mm thick | 26" LX both sides. 26" XLX (X-Laced) inside            |
| 0021749A-00 | 511005-10.47RED | 26in       | RED    | PBO spoke, 4mm thick | 26" LX both sides. 26" XLX (X-Laced) inside            |
| 0021750A-00 | 511005-10.47YEL | 26in       | YELLOW | PBO spoke, 4mm thick | 26" LX both sides. 26" XLX (X-Laced) inside            |
| 0021751A-00 | 511005-10.47WHI | 26in       | WHITE  | PBO spoke, 4mm thick | 26" LX both sides. 26" XLX (X-Laced) inside            |
| 0021752A-00 | 511005-10.47ORA | 26in       | ORANGE | PBO spoke, 4mm thick | 26" LX both sides. 26" XLX (X-Laced) inside            |
| 0021753A-00 | 511005-10.47GRE | 26in       | GREEN  | PBO spoke, 4mm thick | 26" LX both sides. 26" XLX (X-Laced) inside            |
| 0021754A-00 | 511005-10.47PNK | 26in       | PINK   | PBO spoke, 4mm thick | 26" LX both sides. 26" XLX (X-Laced) inside            |
| 0021755A-00 | 511005-10.47PUR | 26in       | PURPLE | PBO spoke, 4mm thick | 26" LX both sides. 26" XLX (X-Laced) inside            |



| <b>Blade LXL &amp; CLX Replacement Spokes (Blade)</b> |                     |                   |              |                 |                       |
|---|---------------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Item#</b>  | <b>Part#</b>        | <b>Wheel Size</b> | <b>Color</b> | <b>Type</b>     | <b>Assigned wheel</b> |
| 0021756A-00   | 511004.B.7.95BLACK  | 20in              | BLACK        | BLADE PBO Spoke | 20" BLADE LXL inside  |
| 0021757A-00   | 511004.B.7.95BLU    | 20in              | BLUE         | BLADE PBO Spoke | 20" BLADE LXL inside  |
| 0021758A-00   | 511004.B.7.95RED    | 20in              | RED          | BLADE PBO Spoke | 20" BLADE LXL inside  |
| 0021759A-00   | 511004.B.7.95YELLOW | 20in              | YELLOW       | BLADE PBO Spoke | 20" BLADE LXL inside  |
| 0021760A-00   | 511004.B.7.95WHITE  | 20in              | WHITE        | BLADE PBO Spoke | 20" BLADE LXL inside  |
| 0021761A-00   | 511004.B.7.95ORANGE | 20in              | ORANGE       | BLADE PBO Spoke | 20" BLADE LXL inside  |
| 0021762A-00   | 511004.B.7.95GREEN  | 20in              | GREEN        | BLADE PBO Spoke | 20" BLADE LXL inside  |
| 0021763A-00   | 511004.B.7.95PINK   | 20in              | PINK         | BLADE PBO Spoke | 20" BLADE LXL inside  |
| 0021764A-00   | 511004.B.7.95PURPLE | 20in              | PURPLE       | BLADE PBO Spoke | 20" BLADE LXL inside  |
| 0021765A-00   | 511004.B.8.05BLACK  | 20in              | BLACK        | BLADE PBO Spoke | 20" BLADE LXL outside |
| 0021766A-00   | 511004.B.8.05BLUE   | 20in              | BLUE         | BLADE PBO Spoke | 20" BLADE LXL outside |
| 0021767A-00   | 511004.B.8.05RED    | 20in              | RED          | BLADE PBO Spoke | 20" BLADE LXL outside |
| 0021768A-00   | 511004.B.8.05YELLOW | 20in              | YELLOW       | BLADE PBO Spoke | 20" BLADE LXL outside |
| 0021769A-00   | 511004.B.8.05WHITE  | 20in              | WHITE        | BLADE PBO Spoke | 20" BLADE LXL outside |
| 0021770A-00   | 511004.B.8.05ORANGE | 20in              | ORANGE       | BLADE PBO Spoke | 20" BLADE LXL outside |
| 0021771A-00   | 511004.B.8.05GREEN  | 20in              | GREEN        | BLADE PBO Spoke | 20" BLADE LXL outside |
| 0021772A-00   | 511004.B.8.05PINK   | 20in              | PINK         | BLADE PBO Spoke | 20" BLADE LXL outside |
| 0021773A-00   | 511004.B.8.05PURPLE | 20in              | PURPLE       | BLADE PBO Spoke | 20" BLADE LXL outside |
| 0021774A-00   | 511004.B.8.90BLACK  | 22in              | BLACK        | BLADE PBO Spoke | 22" BLADE LXL inside  |
| 0021775A-00   | 511004.B.8.90BLUE   | 22in              | BLUE         | BLADE PBO Spoke | 22" BLADE LXL inside  |
| 0021776A-00   | 511004.B.8.90RED    | 22in              | RED          | BLADE PBO Spoke | 22" BLADE LXL inside  |
| 0021777A-00   | 511004.B.8.90YELLOW | 22in              | YELLOW       | BLADE PBO Spoke | 22" BLADE LXL inside  |
| 0021778A-00   | 511004.B.8.90WHITE  | 22in              | WHITE        | BLADE PBO Spoke | 22" BLADE LXL inside  |
| 0021779A-00   | 511004.B.8.90ORANGE | 22in              | ORANGE       | BLADE PBO Spoke | 22" BLADE LXL inside  |
| 0021780A-00   | 511004.B.8.90GREEN  | 22in              | GREEN        | BLADE PBO Spoke | 22" BLADE LXL inside  |
| 0021781A-00   | 511004.B.8.90PINK   | 22in              | PINK         | BLADE PBO Spoke | 22" BLADE LXL inside  |
| 0021782A-00   | 511004.B.8.90PURPLE | 22in              | PURPLE       | BLADE PBO Spoke | 22" BLADE LXL inside  |
| 0021783A-00   | 511004.B.9.05BLACK  | 22in              | BLACK        | BLADE PBO Spoke | 22" BLADE LXL outside |



**Blade LXL & CLX Replacement Spokes (Blade)**

| Item#       | Part#                | Wheel Size | Color  | Type            | Assigned wheel        |
|-------------|----------------------|------------|--------|-----------------|-----------------------|
| 0021784A-00 | 511004.B.9.05BLUE    | 22in       | BLUE   | BLADE PBO Spoke | 22" BLADE LXL outside |
| 0021785A-00 | 511004.B.9.05RED     | 22in       | RED    | BLADE PBO Spoke | 22" BLADE LXL outside |
| 0021786A-00 | 511004.B.9.05YELLOW  | 22in       | YELLOW | BLADE PBO Spoke | 22" BLADE LXL outside |
| 0021787A-00 | 511004.B.9.05WHITE   | 22in       | WHITE  | BLADE PBO Spoke | 22" BLADE LXL outside |
| 0021788A-00 | 511004.B.9.05ORANGE  | 22in       | ORANGE | BLADE PBO Spoke | 22" BLADE LXL outside |
| 0021789A-00 | 511004.B.9.05GREEN   | 22in       | GREEN  | BLADE PBO Spoke | 22" BLADE LXL outside |
| 0021790A-00 | 511004.B.9.05PINK    | 22in       | PINK   | BLADE PBO Spoke | 22" BLADE LXL outside |
| 0021791A-00 | 511004.B.9.05PURPLE  | 22in       | PURPLE | BLADE PBO Spoke | 22" BLADE LXL outside |
| 0021792A-00 | 511004.B.9.70BLACK   | 24in       | BLACK  | BLADE PBO Spoke | 24" BLADE LXL inside  |
| 0021793A-00 | 511004.B.9.70BLU     | 24in       | BLUE   | BLADE PBO Spoke | 24" BLADE LXL inside  |
| 0021794A-00 | 511004.B.9.70RED     | 24in       | RED    | BLADE PBO Spoke | 24" BLADE LXL inside  |
| 0021795A-00 | 511004.B.9.70YELLOW  | 24in       | YELLOW | BLADE PBO Spoke | 24" BLADE LXL inside  |
| 0021796A-00 | 511004.B.9.70WHITE   | 24in       | WHITE  | BLADE PBO Spoke | 24" BLADE LXL inside  |
| 0021797A-00 | 511004.B.9.70ORANGE  | 24in       | ORANGE | BLADE PBO Spoke | 24" BLADE LXL inside  |
| 0021798A-00 | 511004.B.9.70GREEN   | 24in       | GREEN  | BLADE PBO Spoke | 24" BLADE LXL inside  |
| 0021799A-00 | 511004.B.9.70PINK    | 24in       | PINK   | BLADE PBO Spoke | 24" BLADE LXL inside  |
| 0021800A-00 | 511004.B.9.70PURPLE  | 24in       | PURPLE | BLADE PBO Spoke | 24" BLADE LXL inside  |
| 0021801A-00 | 511004.B.9.80BLACK   | 24in       | BLACK  | BLADE PBO Spoke | 24" BLADE LXL outside |
| 0021802A-00 | 511004.B.9.80BLUE    | 24in       | BLUE   | BLADE PBO Spoke | 24" BLADE LXL outside |
| 0021803A-00 | 511004.B.9.80RED     | 24in       | RED    | BLADE PBO Spoke | 24" BLADE LXL outside |
| 0021804A-00 | 511004.B.9.80YELLOW  | 24in       | YELLOW | BLADE PBO Spoke | 24" BLADE LXL outside |
| 0021805A-00 | 511004.B.9.80WHITE   | 24in       | WHITE  | BLADE PBO Spoke | 24" BLADE LXL outside |
| 0021806A-00 | 511004.B.9.80ORANGE  | 24in       | ORANGE | BLADE PBO Spoke | 24" BLADE LXL outside |
| 0021807A-00 | 511004.B.9.80GREEN   | 24in       | GREEN  | BLADE PBO Spoke | 24" BLADE LXL outside |
| 0021808A-00 | 511004.B.9.80PINK    | 24in       | PINK   | BLADE PBO Spoke | 24" BLADE LXL outside |
| 0021809A-00 | 511004.B.9.80PURPLE  | 24in       | PURPLE | BLADE PBO Spoke | 24" BLADE LXL outside |
| 0021810A-00 | 511004.B.10.10BLACK  | 25in       | BLACK  | BLADE PBO Spoke | 25" BLADE LXL inside  |
| 0021811A-00 | 511004.B.10.10BLUE   | 25in       | BLUE   | BLADE PBO Spoke | 25" BLADE LXL inside  |
| 0021812A-00 | 511004.B.10.10RED    | 25in       | RED    | BLADE PBO Spoke | 25" BLADE LXL inside  |
| 0021813A-00 | 511004.B.10.10YELLOW | 25in       | YELLOW | BLADE PBO Spoke | 25" BLADE LXL inside  |



**Blade LXL & CLX Replacement Spokes (Blade)**


| Item#       | Part#                | Wheel Size | Color  | Type            | Assigned wheel        |
|-------------|----------------------|------------|--------|-----------------|-----------------------|
| 0021814A-00 | 511004.B.10.10WHITE  | 25in       | WHITE  | BLADE PBO Spoke | 25" BLADE LXL inside  |
| 0021815A-00 | 511004.B.10.10ORANGE | 25in       | ORANGE | BLADE PBO Spoke | 25" BLADE LXL inside  |
| 0021816A-00 | 511004.B.10.10GREEN  | 25in       | GREEN  | BLADE PBO Spoke | 25" BLADE LXL inside  |
| 0021817A-00 | 511004.B.10.10PINK   | 25in       | PINK   | BLADE PBO Spoke | 25" BLADE LXL inside  |
| 0021818A-00 | 511004.B.10.10PURPLE | 25in       | PURPLE | BLADE PBO Spoke | 25" BLADE LXL inside  |
| 0021819A-00 | 511004.B.10.20BLACK  | 25in       | BLACK  | BLADE PBO Spoke | 25" BLADE LXL outside |
| 0021820A-00 | 511004.B.10.20BLUE   | 25in       | BLUE   | BLADE PBO Spoke | 25" BLADE LXL outside |
| 0021821A-00 | 511004.B.10.20RED    | 25in       | RED    | BLADE PBO Spoke | 25" BLADE LXL outside |
| 0021822A-00 | 511004.B.10.20YELLOW | 25in       | YELLOW | BLADE PBO Spoke | 25" BLADE LXL outside |
| 0021823A-00 | 511004.B.10.20WHITE  | 25in       | WHITE  | BLADE PBO Spoke | 25" BLADE LXL outside |
| 0021824A-00 | 511004.B.10.20ORANGE | 25in       | ORANGE | BLADE PBO Spoke | 25" BLADE LXL outside |
| 0021825A-00 | 511004.B.10.20GREEN  | 25in       | GREEN  | BLADE PBO Spoke | 25" BLADE LXL outside |
| 0021826A-00 | 511004.B.10.20PINK   | 25in       | PINK   | BLADE PBO Spoke | 25" BLADE LXL outside |
| 0021827A-00 | 511004.B.10.20PURPLE | 25in       | PURPLE | BLADE PBO Spoke | 25" BLADE LXL outside |
| 0021828A-00 | 511004.B.10.70BLACK  | 26in       | BLACK  | BLADE PBO Spoke | 26" BLADE LXL inside  |
| 0021829A-00 | 511004.B.10.70BLUE   | 26in       | BLUE   | BLADE PBO Spoke | 26" BLADE LXL inside  |
| 0021830A-00 | 511004.B.10.70RED    | 26in       | RED    | BLADE PBO Spoke | 26" BLADE LXL inside  |
| 0021831A-00 | 511004.B.10.70YELLOW | 26in       | YELLOW | BLADE PBO Spoke | 26" BLADE LXL inside  |
| 0021832A-00 | 511004.B.10.70WHITE  | 26in       | WHITE  | BLADE PBO Spoke | 26" BLADE LXL inside  |
| 0021833A-00 | 511004.B.10.70ORANGE | 26in       | ORANGE | BLADE PBO Spoke | 26" BLADE LXL inside  |
| 0021834A-00 | 511004.B.10.70GREEN  | 26in       | GREEN  | BLADE PBO Spoke | 26" BLADE LXL inside  |
| 0021835A-00 | 511004.B.10.70PINK   | 26in       | PINK   | BLADE PBO Spoke | 26" BLADE LXL inside  |
| 0021836A-00 | 511004.B.10.70PURPLE | 26in       | PURPLE | BLADE PBO Spoke | 26" BLADE LXL inside  |
| 0021837A-00 | 511004.B.10.80BLACK  | 26in       | BLACK  | BLADE PBO Spoke | 26" BLADE LXL outside |
| 0021838A-00 | 511004.B.10.80BLUE   | 26in       | BLUE   | BLADE PBO Spoke | 26" BLADE LXL outside |
| 0021839A-00 | 511004.B.10.80RED    | 26in       | RED    | BLADE PBO Spoke | 26" BLADE LXL outside |
| 0021840A-00 | 511004.B.10.80YELLOW | 26in       | YELLOW | BLADE PBO Spoke | 26" BLADE LXL outside |
| 0021841A-00 | 511004.B.10.80WHITE  | 26in       | WHITE  | BLADE PBO Spoke | 26" BLADE LXL outside |
| 0021842A-00 | 511004.B.10.80ORANGE | 26in       | ORANGE | BLADE PBO Spoke | 26" BLADE LXL outside |
| 0021843A-00 | 511004.B.10.80GREEN  | 26in       | GREEN  | BLADE PBO Spoke | 26" BLADE LXL outside |
| 0021844A-00 | 511004.B.10.80PINK   | 26in       | PINK   | BLADE PBO Spoke | 26" BLADE LXL outside |
| 0021845A-00 | 511004.B.10.80PURPLE | 26in       | PURPLE | BLADE PBO Spoke | 26" BLADE LXL outside |



**LX, XLX, SLX, XSLX Replacement Spokes**

| Item#       | Spinergy Part# | Wheel Size | Color  | Type                 | Assigned wheel   |
|-------------|----------------|------------|--------|----------------------|--|
| 0021720A-00 | 511005-8.75BLA | 22in       | BLACK  | PBO spoke, 4mm thick | 22" LX both sides. 22" XLX (X-Laced) inside            |
| 0021721A-00 | 511005-8.75BLU | 22in       | BLUE   | PBO spoke, 4mm thick | 22" LX both sides. 22" XLX (X-Laced) inside            |
| 0021722A-00 | 511005-8.75RED | 22in       | RED    | PBO spoke, 4mm thick | 22" LX both sides. 22" XLX (X-Laced) inside            |
| 0021723A-00 | 511005-8.75YEL | 22in       | YELLOW | PBO spoke, 4mm thick | 22" LX both sides. 22" XLX (X-Laced) inside            |
| 0021724A-00 | 511005-8.75WHI | 22in       | WHITE  | PBO spoke, 4mm thick | 22" LX both sides. 22" XLX (X-Laced) inside            |
| 0021725A-00 | 511005-8.75ORA | 22in       | ORANGE | PBO spoke, 4mm thick | 22" LX both sides. 22" XLX (X-Laced) inside            |
| 0021726A-00 | 511005-8.75GRE | 22in       | GREEN  | PBO spoke, 4mm thick | 22" LX both sides. 22" XLX (X-Laced) inside            |
| 0021727A-00 | 511005-8.75PNK | 22in       | PINK   | PBO spoke, 4mm thick | 22" LX both sides. 22" XLX (X-Laced) inside            |
| 0021728A-00 | 511005-8.75PUR | 22in       | PURPLE | PBO spoke, 4mm thick | 22" LX both sides. 22" XLX (X-Laced) inside            |
| 0021729A-00 | 511005-9.50BLA | 24in       | BLACK  | PBO spoke, 4mm thick | 24" LX, SLX both sides. 24" XLX, XSLX (X-Laced) inside |
| 0021730A-00 | 511005-9.50BLU | 24in       | BLUE   | PBO spoke, 4mm thick | 24" LX, SLX both sides. 24" XLX, XSLX (X-Laced) inside |
| 0021731A-00 | 511005-9.50RED | 24in       | RED    | PBO spoke, 4mm thick | 24" LX, SLX both sides. 24" XLX, XSLX (X-Laced) inside |
| 0021732A-00 | 511005-9.50YEL | 24in       | YELLOW | PBO spoke, 4mm thick | 24" LX, SLX both sides. 24" XLX, XSLX (X-Laced) inside |
| 0021733A-00 | 511005-9.50WHI | 24in       | WHITE  | PBO spoke, 4mm thick | 24" LX, SLX both sides. 24" XLX, XSLX (X-Laced) inside |
| 0021734A-00 | 511005-9.50ORA | 24in       | ORANGE | PBO spoke, 4mm thick | 24" LX, SLX both sides. 24" XLX, XSLX (X-Laced) inside |
| 0021735A-00 | 511005-9.50GRE | 24in       | GREEN  | PBO spoke, 4mm thick | 24" LX, SLX both sides. 24" XLX, XSLX (X-Laced) inside |
| 0021736A-00 | 511005-9.50PNK | 24in       | PINK   | PBO spoke, 4mm thick | 24" LX, SLX both sides. 24" XLX, XSLX (X-Laced) inside |

**Catalogue de roues arrière**  
**Roues arrières & rayons**

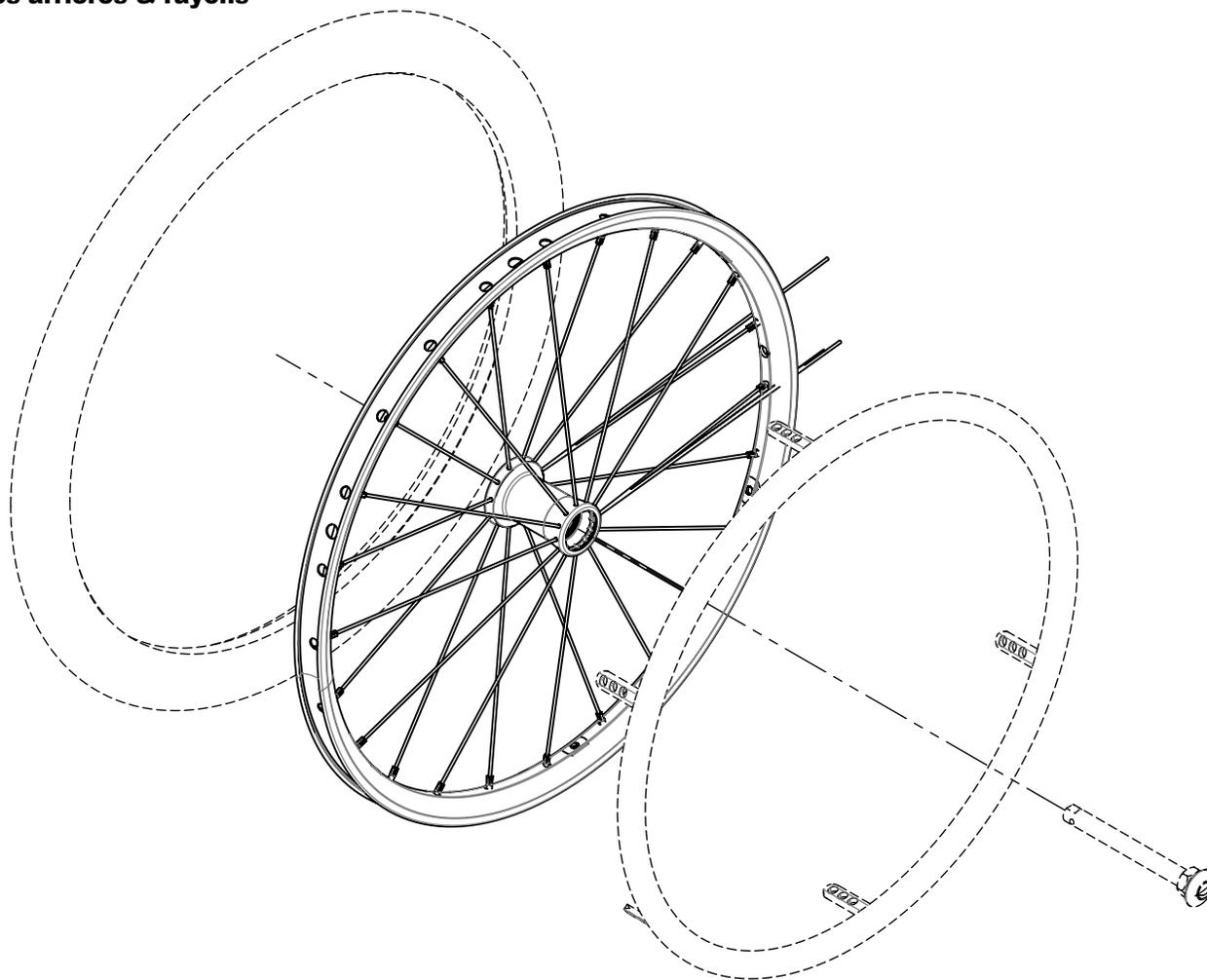


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                         | QTÉ |
|----------|-------------|-------------------------------------|-----|
| 1        | 9001483A-00 | ROUE ARRIÈRE - PLASTIQUE MAG, 20po  | 1   |
| 2        | 9001484A-00 | ROUE ARRIÈRE - PLASTIQUE MAG, 22po  | 1   |
| 3        | 9001485A-00 | ROUE ARRIÈRE - PLASTIQUE MAG, 24po  | 1   |
| 4        | 9001446A-00 | ROUE ARRIÈRE - NEWTON ONE, 20po     | 1   |
| 5        | 9001486A-00 | ROUE ARRIÈRE - NEWTON ONE, 22po     | 1   |
| 6        | 9001487A-00 | ROUE ARRIÈRE - NEWTON ONE, 24po     | 1   |
| 7        | 9001488A-00 | ROUE ARRIÈRE - NEWTON GRAVITY, 20po | 1   |
| 8        | 9001489A-00 | ROUE ARRIÈRE - NEWTON GRAVITY, 22po | 1   |
| 9        | 9001490A-00 | ROUE ARRIÈRE - NEWTON GRAVITY, 24po | 1   |
| 10       | 9001491A-00 | ROUE ARRIÈRE - NEWTON GRAVITY, 25po | 1   |
| 11       | 9001492A-00 | ROUE ARRIÈRE - NEWTON GRAVITY, 26po | 1   |

**REPLACEMENT DE  
 ROULEMENT À BILLES**  
**POUR TOUTES LES ROUES**  
**NOPIÈCE: 0022011A-00**

**QUINCAILLERIE INCLUSE AVEC LES ROUES NEWTON**

**NEWTON ONE**

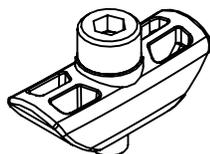

**NEWTON GRAVITY**



|               | RAYONS DE ROUE       |                    |                     |                |                |
|---------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------|
|               | NEWTON ONE (24)      |                    | NEWTON GRAVITY (24) |                |                |
|               | EXT. & INT. ARGENT   | EXT. & INT. ARGENT | EXT. BLANC (1)      | EXT. NOIR (11) | INT. NOIR (12) |
| 20"           | 21271 (1)            |                    | 21157               | 21156 (1)      | 21155 (1)      |
| 22"           |                      | 21153 (1)          | 21160               | 21159 (1)      | 21158 (1)      |
| 24"           |                      | 21154 (1)          | 21163               | 21162 (1)      | 21161 (1)      |
| 25"           | -                    | -                  | 21166               | 21165 (1)      | 21164 (1)      |
| 26"           | -                    | -                  | 21169               | 21168 (1)      | 21167 (1)      |
| <b>ECROUS</b> | 21181 (ECROU ARGENT) |                    | 21180 (ECROU NOIR)  |                |                |

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue de roues arrière**  
**Roues arrières Spinergy CLX Blade**



**SPINERGY CLX BLADE**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                     | QTÉ |
|----------|-------------|---|-----|
| 1        | 9008122A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY CLX BLADE, 24PO, NOIR   | 1   |
| 2        | 9008123A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY CLX BLADE, 25PO, NOIR   | 1   |
| 3        | 9008127A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY CLX BLADE, 24PO, BLEU   | 1   |
| 4        | 9008128A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY CLX BLADE, 25PO, BLEU   | 1   |
| 5        | 9008132A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY CLX BLADE, 24PO, ROUGE  | 1   |
| 6        | 9008133A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY CLX BLADE, 25PO, ROUGE  | 1   |
| 7        | 9008137A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY CLX BLADE, 24PO, VERT   | 1   |
| 8        | 9008138A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY CLX BLADE, 25PO, VERT   | 1   |
| 9        | 9008142A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY CLX BLADE, 24PO, ORANGE | 1   |
| 10       | 9008143A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY CLX BLADE, 25PO, ORANGE | 1   |
| 11       | 9008147A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY CLX BLADE, 24PO, JAUNE  | 1   |
| 12       | 9008148A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY CLX BLADE, 25PO, JAUNE  | 1   |
| 13       | 9008152A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY CLX BLADE, 24PO, ROSE   | 1   |
| 14       | 9008153A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY CLX BLADE, 25PO, ROSE   | 1   |
| 15       | 9008157A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY CLX BLADE, 24PO, BLANC  | 1   |
| 16       | 9008158A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY CLX BLADE, 25PO, BLANC  | 1   |
| 17       | 9008162A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY CLX BLADE, 24PO, VIOLET | 1   |
| 18       | 9008163A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY CLX BLADE, 25PO, VIOLET | 1   |



**REPLACEMENT DE  
ROULEMENT À BILLES**

**POUR TOUTES LES ROUES**

**NoPIÈCE: 22011**



NE PREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue de roues arrière**  
**Roues arrières Spinergy**

**REPLACEMENT DE ROUEMENT À BILLES**

**POUR TOUTES LES ROUES**

**NoPIÈCE: 22011**



**SPINERGY SPOX**



**SPINERGY LX**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                               | QTÉ |
|----------|-------------|---|-----|
| 1        | 9001494A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY SPOX, 22PO, NOIR  | 1   |
| 2        | 9001495A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY SPOX, 24PO, NOIR  | 1   |
| 3        | 9001496A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY SPOX, 25PO, NOIR  | 1   |
| 4        | 9001497A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY SPOX, 26PO, NOIR  | 1   |
| 5        | 9003413A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY SPOX, 22PO, BLEU  | 1   |
| 6        | 9003414A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY SPOX, 24PO, BLEU  | 1   |
| 7        | 9003415A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY SPOX, 25PO, BLEU  | 1   |
| 8        | 9003416A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY SPOX, 26PO, BLEU  | 1   |
| 9        | 9003418A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY SPOX, 22PO, ROUGE | 1   |
| 10       | 9003419A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY SPOX, 24PO, ROUGE | 1   |
| 11       | 9003420A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY SPOX, 25PO, ROUGE | 1   |
| 12       | 9003421A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY SPOX, 26PO, ROUGE | 1   |
| 13       | 9003433A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY SPOX, 22PO, JAUNE | 1   |
| 14       | 9003434A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY SPOX, 24PO, JAUNE | 1   |
| 15       | 9003435A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY SPOX, 25PO, JAUNE | 1   |
| 16       | 9003436A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY SPOX, 26PO, JAUNE | 1   |
| 17       | 9003443A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY SPOX, 22PO, BLANC | 1   |
| 18       | 9003444A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY SPOX, 24PO, BLANC | 1   |
| 19       | 9003445A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY SPOX, 25PO, BLANC | 1   |
| 20       | 9003446A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY SPOX, 26PO, BLANC | 1   |


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                              | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 21       | 9001498A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 22PO, NOIR   | 1   |
| 22       | 9001499A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 24PO, NOIR   | 1   |
| 23       | 9001500A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 25PO, NOIR   | 1   |
| 24       | 9001501A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 26PO, NOIR   | 1   |
| 25       | 9003448A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 22PO, BLEU   | 1   |
| 26       | 9003449A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 24PO, BLEU   | 1   |
| 27       | 9003450A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 25PO, BLEU   | 1   |
| 28       | 9003451A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 26PO, BLEU   | 1   |
| 29       | 9003453A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 22PO, ROUGE  | 1   |
| 30       | 9003454A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 24PO, ROUGE  | 1   |
| 31       | 9003455A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 25PO, ROUGE  | 1   |
| 32       | 9003456A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 26PO, ROUGE  | 1   |
| 33       | 9003458A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 22PO, VERT   | 1   |
| 34       | 9003459A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 24PO, VERT   | 1   |
| 35       | 9003460A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 25PO, VERT   | 1   |
| 36       | 9003461A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 26PO, VERT   | 1   |
| 37       | 9003463A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 22PO, ORANGE | 1   |
| 38       | 9003464A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 24PO, ORANGE | 1   |
| 39       | 9003465A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 25PO, ORANGE | 1   |
| 40       | 9003466A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 26PO, ORANGE | 1   |
| 41       | 9003468A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 22PO, JAUNE  | 1   |
| 42       | 9003469A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 24PO, JAUNE  | 1   |
| 43       | 9003470A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 25PO, JAUNE  | 1   |
| 44       | 9003471A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 26PO, JAUNE  | 1   |
| 45       | 9003473A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 22PO, ROSE   | 1   |
| 46       | 9003474A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 24PO, ROSE   | 1   |
| 47       | 9003475A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 25PO, ROSE   | 1   |
| 48       | 9003476A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 26PO, ROSE   | 1   |
| 49       | 9003478A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 22PO, BLANC  | 1   |
| 50       | 9003479A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 24PO, BLANC  | 1   |
| 51       | 9003480A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 25PO, BLANC  | 1   |
| 52       | 9003481A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 26PO, BLANC  | 1   |
| 53       | 9003482A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 22PO, VIOLET | 1   |
| 54       | 9003483A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 24PO, VIOLET | 1   |
| 55       | 9003484A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 25PO, VIOLET | 1   |
| 56       | 9003485A-00 | ROUE ARRIÈRE - SPINERGY LX, 26PO, VIOLET | 1   |



**SEULES COULEURS  
DISPONIBLES POUR  
SPINERGY SPOX**

**ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE  
NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS  
AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL  
MOTION COMPOSITES**

**Catalogue de roues arrière**  
**Roues arrière + pneus**

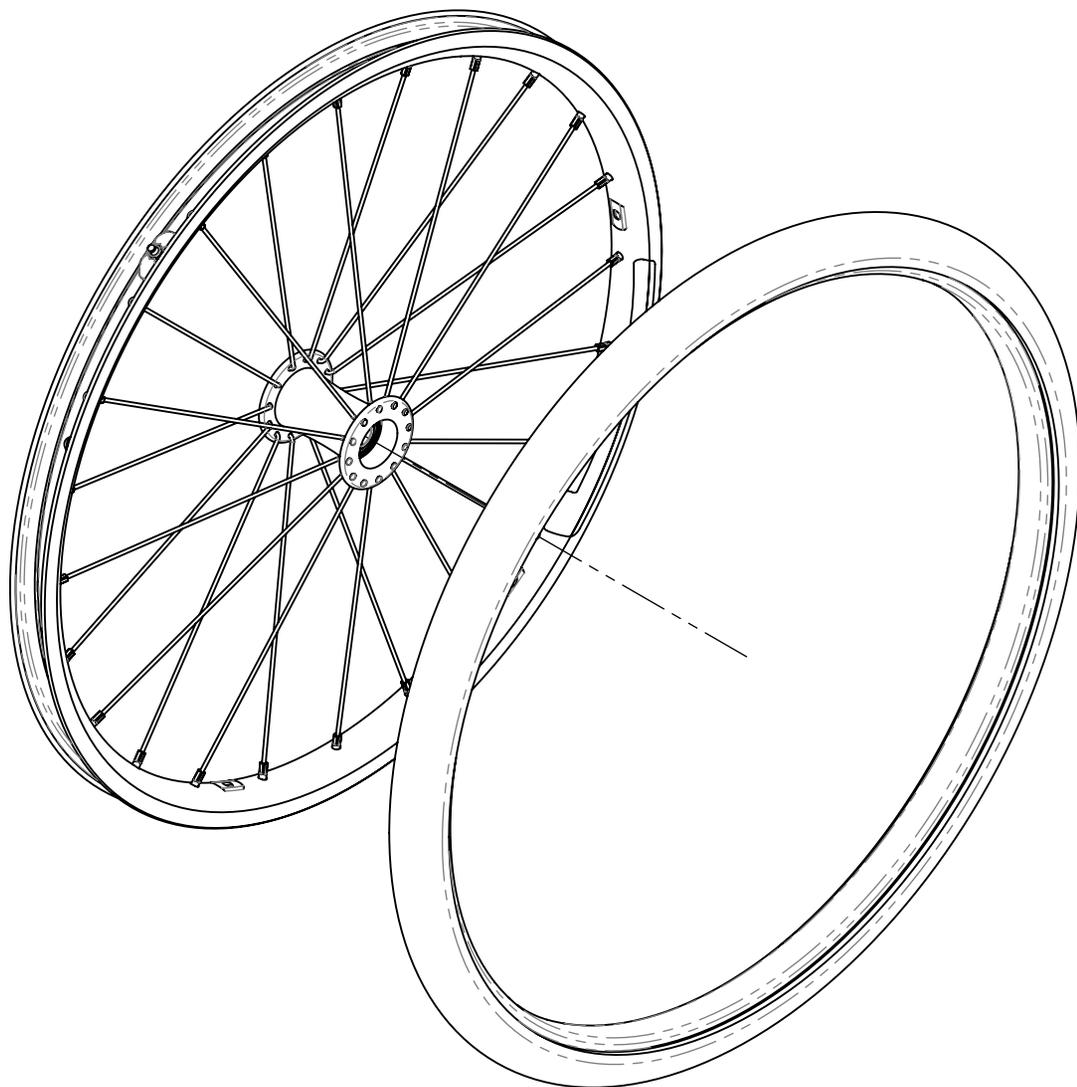

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                   | QTÉ |
|----------|-------------|---|-----|
| 1        | 9002499A-00 | ROUE NEWTON ONE & PNEU SEMI-DUR 20po          | 1   |
| 2        | 9002500A-00 | ROUE NEWTON ONE & PNEU SEMI-DUR 22po          | 1   |
| 3        | 9002501A-00 | ROUE NEWTON ONE & PNEU SEMI-DUR 24po          | 1   |
| 4        | 9002502A-00 | ROUE NEWTON GRAVITY & PNEU SEMI-DUR 20po      | 1   |
| 5        | 9002503A-00 | ROUE NEWTON GRAVITY & PNEU SEMI-DUR 22po      | 1   |
| 6        | 9002504A-00 | ROUE NEWTON GRAVITY & PNEU SEMI-DUR 24po      | 1   |
| 7        | 9002497A-00 | ROUE NEWTON ONE & PNEU HP, 20po               | 1   |
| 8        | 9002505A-00 | ROUE NEWTON ONE & PNEU HP, 22po               | 1   |
| 9        | 9002506A-00 | ROUE NEWTON ONE & PNEU HP, 24po               | 1   |
| 10       | 9002507A-00 | ROUE NEWTON GRAVITY & PNEU HP, 20po           | 1   |
| 11       | 9002508A-00 | ROUE NEWTON GRAVITY & PNEU HP, 22po           | 1   |
| 12       | 9002509A-00 | ROUE NEWTON GRAVITY & PNEU HP, 24po           | 1   |
| 13       | 9002519A-00 | ROUE NEWTON GRAVITY & PNEU HP, 25po           | 1   |
| 14       | 9002510A-00 | ROUE NEWTON GRAVITY & PNEU HP, 26po           | 1   |
| 15       | 9002498A-00 | ROUE NEWTON ONE & PNEU PRESSION STD, 20po     | 1   |
| 16       | 9002511A-00 | ROUE NEWTON ONE & PNEU PRESSION STD, 22po     | 1   |
| 17       | 9002512A-00 | ROUE NEWTON ONE & PNEU PRESSION STD, 24po     | 1   |
| 18       | 9002513A-00 | ROUE NEWTON GRAVITY & PNEU PRESSION STD, 20po | 1   |
| 19       | 9002514A-00 | ROUE NEWTON GRAVITY & PNEU PRESSION STD, 22po | 1   |
| 20       | 9002515A-00 | ROUE NEWTON GRAVITY & PNEU PRESSION STD, 24po | 1   |
| 21       | 9002520A-00 | ROUE NEWTON GRAVITY & PNEU PRESSION STD, 25po | 1   |
| 22       | 9002516A-00 | ROUE NEWTON GRAVITY & PNEU PRESSION STD, 26po | 1   |


**REPLACEMENT DE  
 ROULEMENT À BILLES**

**POUR TOUTES LES ROUES**

**NOPIÈCE: 22011**


**Catalogue de roues arrière  
Protèges-rayons**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION           | QTÉ |
|----------|-------------|-----------------------|-----|
| 1        | 9001629A-00 | PROTÈGE-RAYONS - 20po | 1   |
| 2        | 9001630A-00 | PROTÈGE-RAYONS - 22po | 1   |
| 3        | 9001631A-00 | PROTÈGE-RAYONS - 24po | 1   |
| 4        | 9001632A-00 | PROTÈGE-RAYONS - 26po | 1   |

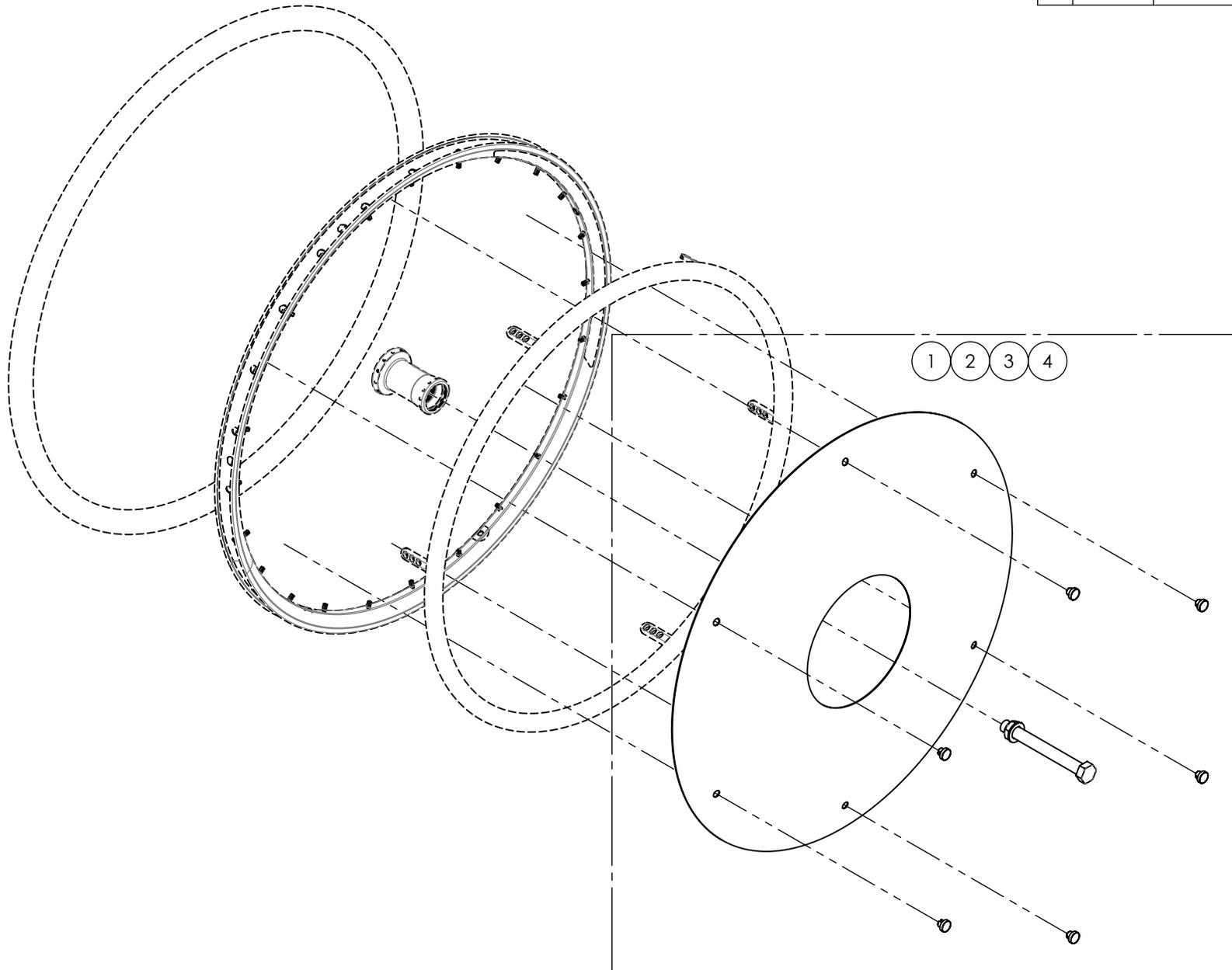

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

## Catalogue de roues arrière Pneus

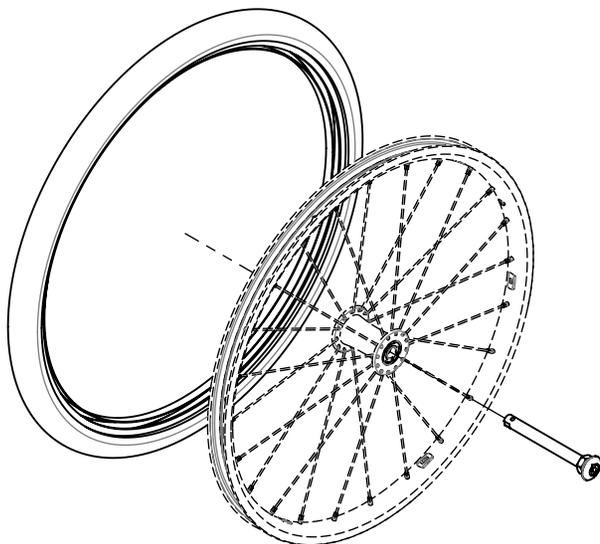

**LES TUBES ET FONDS DE JANTE SONT DÉJÀ  
INCLUS DANS TOUS LES PNEUMATIQUES**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION  | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 1        | 0021365A-00 | PNEUS SEMI-DURS 20x1-1/4po                         | 1   |
| 2        | 0021366B-00 | PNEUS SEMI-DURS 22x1-1/4po                         | 1   |
| 3        | 0021367B-00 | PNEUS SEMI-DURS 24x1-1/4po                         | 1   |
| 4        | 9001510A-00 | PNEU & COMP - PRESSION STD, 1% <b>X20po</b>        | 1   |
|          | 0021315A-00 | PNEUS PNEUMATIQUE 20x1-3/8po                       | 1   |
|          | 0021255A-00 | CHAMBRE À AIR SCHRADER 20x1%po                     | 1   |
|          | 0021064A-00 | FOND DE JANTE 20po                                 | 1   |
| 5        | 9001511A-00 | PNEU & COMP - PRESSION STD, 1% <b>X22po</b>        | 1   |
|          | 0021316A-00 | PNEUS PNEUMATIQUE 22x1-3/8po                       | 1   |
|          | 0021256A-00 | CHAMBRE À AIR SCHRADER 22x1%po                     | 1   |
|          | 0021065A-00 | FOND DE JANTE 22po                                 | 1   |
| 6        | 9001512A-00 | PNEU & COMP - PRESSION STD, 1% <b>X24po</b>        | 1   |
|          | 0021317A-00 | PNEUS PNEUMATIQUE 24x1-3/8po                       | 1   |
|          | 0021257A-00 | CHAMBRE À AIR SCHRADER 24x1%po                     | 1   |
|          | 0021066A-00 | FOND DE JANTE 24po                                 | 1   |
| 7        | 9001513A-00 | PNEU & COMP - PRESSION STD, 1% <b>X25po</b>        | 1   |
|          | 0021318A-00 | PNEUS PNEUMATIQUE 25x1-3/8po                       | 1   |
|          | 0021253A-00 | CHAMBRE À AIR SCHRADER 25x1po                      | 1   |
|          | 0021067A-00 | FOND DE JANTE 25po                                 | 1   |
| 8        | 9001514A-00 | PNEU & COMP - PRESSION STD, 1% <b>X26po</b>        | 1   |
|          | 0021319A-00 | PNEUS PNEUMATIQUE 26x1-3/8po                       | 1   |
|          | 0021259A-00 | CHAMBRE À AIR SCHRADER 26x1%po                     | 1   |
|          | 0021068A-00 | FOND DE JANTE 26po                                 | 1   |
| 9        | 0021391A-00 | PNEUS DURS 22po - PYRAMID                          | 1   |
| 10       | 0021392A-00 | PNEUS DURS 24po - PYRAMID                          | 1   |
| 11       | 0021393A-00 | PNEUS DURS 25po - PYRAMID                          | 1   |
| 12       | 9001517A-00 | PNEU & COMP - SCHWALBE RIGHTRUN HP, 1x <b>20po</b> | 1   |
|          | 0021305A-00 | PNEUS HP RIGHTRUN 20x1po                           | 1   |
|          | 0021250A-00 | CHAMBRE À AIR SCHRADER 20x1po                      | 1   |
|          | 0021064A-00 | FOND DE JANTE 20po                                 | 1   |
| 13       | 9001518A-00 | PNEU & COMP - SCHWALBE RIGHTRUN HP, 1x <b>22po</b> | 1   |
|          | 0021306A-00 | PNEUS HP RIGHTRUN 22x1po                           | 1   |
|          | 0021251A-00 | CHAMBRE À AIR SCHRADER 22x1po                      | 1   |
|          | 0021065A-00 | FOND DE JANTE 22po                                 | 1   |
| 14       | 9001519A-00 | PNEU & COMP - SCHWALBE RIGHTRUN HP, 1x <b>24po</b> | 1   |
|          | 0021307A-00 | PNEUS HP RIGHTRUN 24x1po                           | 1   |
|          | 0021252A-00 | CHAMBRE À AIR SCHRADER 24x1po                      | 1   |
|          | 0021066A-00 | FOND DE JANTE 24po                                 | 1   |
| 15       | 9001520A-00 | PNEU & COMP - SCHWALBE RIGHTRUN HP, 1x <b>25po</b> | 1   |
|          | 0021308A-00 | PNEUS HP RIGHTRUN 25x1po                           | 1   |
|          | 0021253A-00 | CHAMBRE À AIR SCHRADER 25x1po                      | 1   |
|          | 0021067A-00 | FOND DE JANTE 25po                                 | 1   |
| 16       | 9001521A-00 | PNEU & COMP - SCHWALBE RIGHTRUN HP, 1x <b>26po</b> | 1   |
|          | 0021309A-00 | PNEUS HP RIGHTRUN 26x1po                           | 1   |
|          | 0021254A-00 | CHAMBRE À AIR SCHRADER 26x1po                      | 1   |
|          | 0021068A-00 | FOND DE JANTE 26po                                 | 1   |

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION  | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 17       | 9001522-00  | PNEU & COMP - KENDA KOURIER HP, 1% <b>x24po</b>      | 1   |
|          | 0021322A-00 | PNEUS KOURIER 24POX1-3/8po                           | 1   |
|          | 0021257A-00 | CHAMBRE À AIR SCHRADER 24x1%po                       | 1   |
|          | 0021066A-00 | FOND DE JANTE 24po                                   | 1   |
| 18       | 9001523-00  | PNEU & COMP - KENDA KOURIER HP, 1% <b>x26po</b>      | 1   |
|          | 0021324A-00 | PNEUS KOURIER 26POX1-3/8po                           | 1   |
|          | 0021259A-00 | CHAMBRE À AIR SCHRADER 26x1%po                       | 1   |
|          | 0021068A-00 | FOND DE JANTE 26po                                   | 1   |
| 19       | 0021356A-00 | PNEUS SEMI-DURS HP SHOX 22 <b>POX1po</b>             | 1   |
| 20       | 0021357A-00 | PNEUS SEMI-DURS HP SHOX 24 <b>POX1po</b>             | 1   |
| 21       | 0021358A-00 | PNEUS SEMI-DURS HP SHOX 25 <b>POX1po</b>             | 1   |
| 22       | 0021359A-00 | PNEUS SEMI-DURS HP SHOX 26 <b>POX1po</b>             | 1   |
| 23       | 9001528A-00 | PNEU & COMP - SCHWALBE MARATHON PLUS, 1x <b>24po</b> | 1   |
|          | 0021312A-00 | PNEUS HP MARATHON PLUS 24x1po                        | 1   |
|          | 0021252A-00 | CHAMBRE À AIR SCHRADER 24x1po                        | 1   |
|          | 0021066A-00 | FOND DE JANTE 24po                                   | 1   |
| 24       | 9001529A-00 | PNEU & COMP - SCHWALBE MARATHON PLUS, 1x <b>25po</b> | 1   |
|          | 0021313A-00 | PNEUS HP MARATHON PLUS 25x1po                        | 1   |
|          | 0021253A-00 | CHAMBRE À AIR SCHRADER 25x1po                        | 1   |
|          | 0021067A-00 | FOND DE JANTE 25po                                   | 1   |
| 25       | 9001530A-00 | PNEU & COMP - SCHWALBE MARATHON PLUS, 1x <b>26po</b> | 1   |
|          | 0021314A-00 | PNEUS HP MARATHON PLUS 26x1po                        | 1   |
|          | 0021254A-00 | CHAMBRE À AIR SCHRADER 26x1po                        | 1   |
|          | 0021068A-00 | FOND DE JANTE 26po                                   | 1   |
| 26       | 0021375A    | PNEUS SEMI-DURS A CRAMPON 22x1% <b>po</b>            | 1   |
| 27       | 0021376B-00 | PNEUS SEMI-DURS A CRAMPON 24x1% <b>po</b>            | 1   |
| 28       | 0021377A-00 | PNEUS SEMI-DURS A CRAMPON 25x1% <b>po</b>            | 1   |
| 29       | 0021378A-00 | PNEUS SEMI-DURS A CRAMPON 26x1% <b>po</b>            | 1   |
| 30       | 9003044A-00 | PNEU & COMP - PNEUMATIQUE À CRAMPON, 2x <b>22po</b>  | 1   |
|          | 0021379A-00 | PNEUS PNEUMATIQUE A CRAMPON 22x2po                   | 1   |
|          | 0021065A-00 | FOND DE JANTE 22po                                   | 1   |
|          | 0021256A-00 | CHAMBRE À AIR SCHRADER 22x1%po                       | 1   |
| 31       | 9003045A-00 | PNEU & COMP - PNEUMATIQUE À CRAMPON, 2x <b>24po</b>  | 1   |
|          | 0021380A-00 | PNEUS PNEUMATIQUE A CRAMPON 24x2po                   | 1   |
|          | 0021266A-00 | CHAMBRE À AIR SCHRADER 24x2po                        | 1   |
|          | 0021066A-00 | FOND DE JANTE 24po                                   | 1   |
| 32       | 9003046A-00 | PNEU & COMP - PNEUMATIQUE À CRAMPON, 2x <b>25po</b>  | 1   |
|          | 0021381A-00 | PNEUS PNEUMATIQUE A CRAMPON 25x2po                   | 1   |
|          | 0021267A-00 | CHAMBRE À AIR SCHRADER 25x2po                        | 1   |
|          | 0021067A-00 | FOND DE JANTE 25po                                   | 1   |



ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**0041056A\_0041057A**  
**BLOCAGE DE ROUE NEWTON PAR POUSSÉE - ASSY**


| NO. ITEM | DESCRIPTION                                       | 0041056 /QTE | 0041057 /QTE |
|----------|---|--------------|--------------|
| 1        | BLOCAGE DE ROUE NEWTON PAR POUSSÉE, DROIT - ASSY  | -            | 1            |
| 2        | BLOCAGE DE ROUE NEWTON PAR POUSSÉE, GAUCHE - ASSY | 1            | -            |

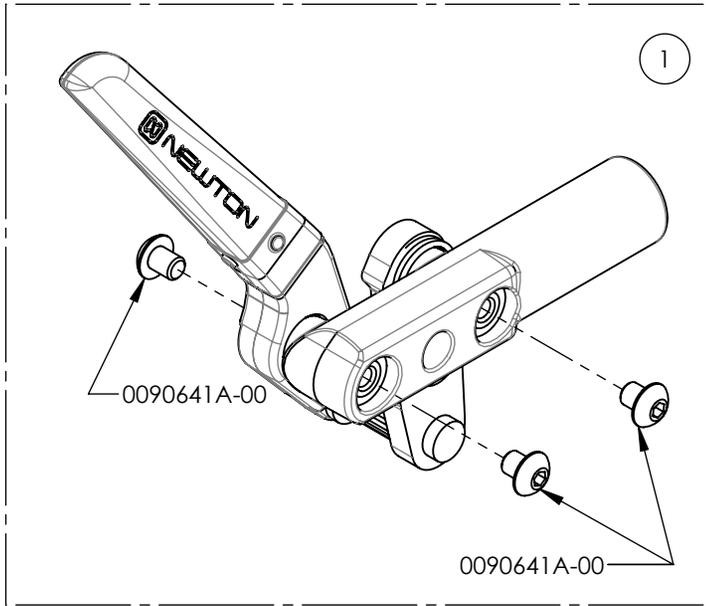

0041057A-00  
 BLOCAGE DE ROUE NEWTON PAR POUSSÉE,  
 DROIT - ASSY

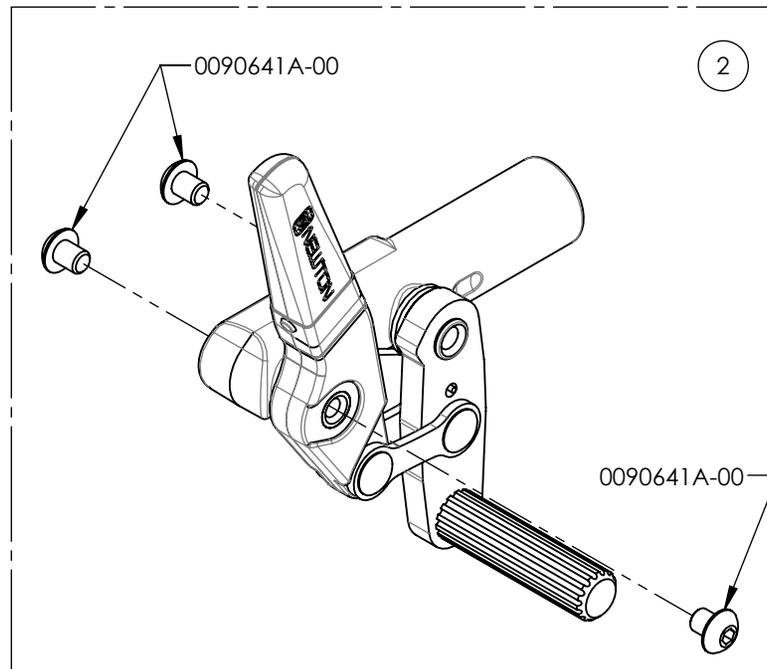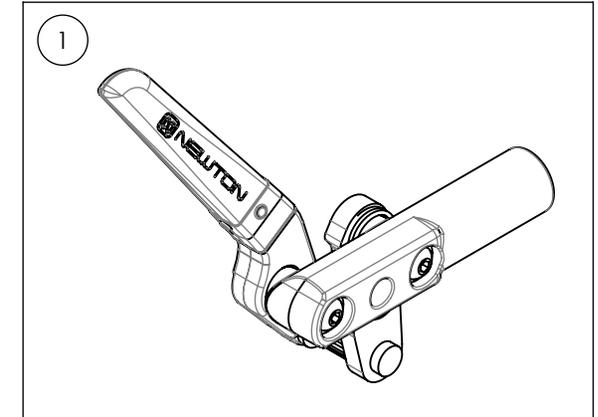




0041056A-00  
 BLOCAGE DE ROUE NEWTON PAR POUSSÉE,  
 GAUCHE - ASSY

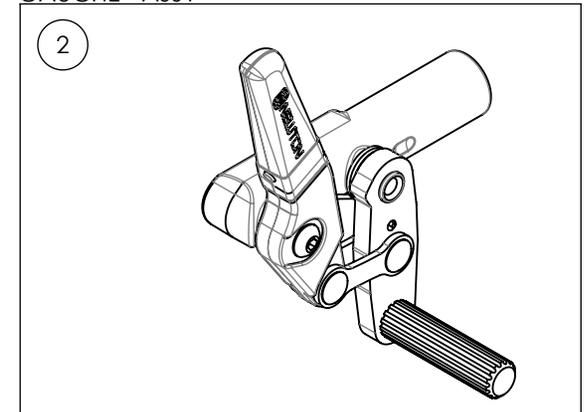


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**0041076B\_0041077B**  
**BLOCAGE POUSSÉE NEWTON V2 & RALL - ASSY**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION  | 0041076/<br>QTE | 0041077/<br>QTE | EXTRA |
|----------|-------------|--|-----------------|-----------------|-------|
| 1        | 0041516B-00 | BLOCAGE POUSSÉE NEWTON V2, DROITE - ASSY           | 1               | -               | -     |
| 2        | 0041517B-00 | BLOCAGE POUSSÉE NEWTON V2, GAUCHE - ASSY           | -               | 1               | -     |
| 3        | 0041500A-00 | RALLONGE LEVIER FREIN AMOVIBLE NEWTON - ASSEMBLAGE | -               | -               | 1     |

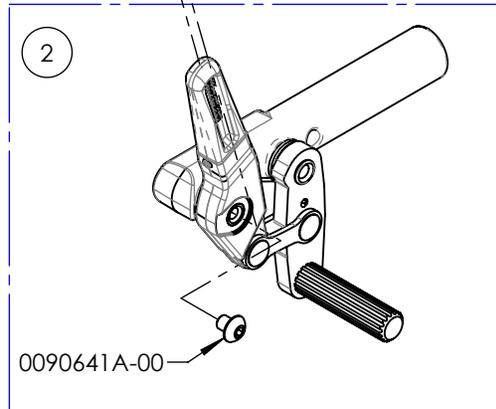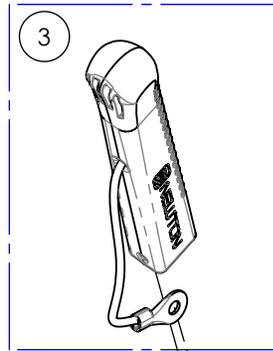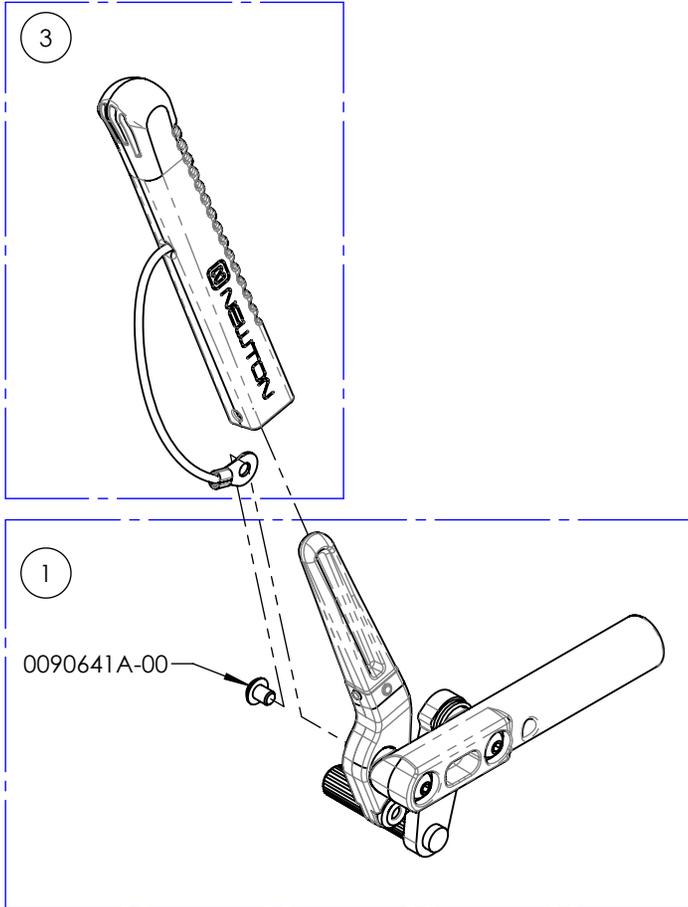

0041076B-00  
 BLOCAGE POUSSÉE NEWTON V2 &  
 RALL, DROITE - ASSY

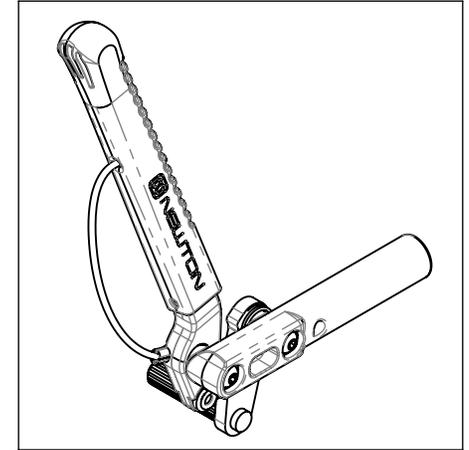


0041077B-00  
 BLOCAGE POUSSÉE NEWTON V2 &  
 RALL, GAUCHE - ASSY

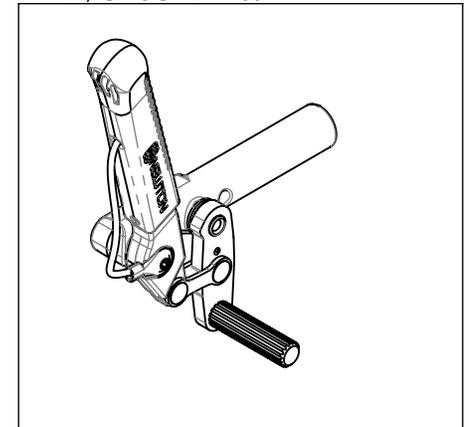


**0041078A\_0041079A**  
**BLOCAGE PAR TRACTION ALU**


| No. ITEM | DESCRIPTION                      | 0041078 /QTE | 0041079 /QTE |
|----------|----------------------------------|--------------|--------------|
| 1        | BLOCAGE PAR TRACTION ALU, DROITE | 1            | -            |
| 2        | BLOCAGE PAR TRACTION ALU, GAUCHE | -            | 1            |

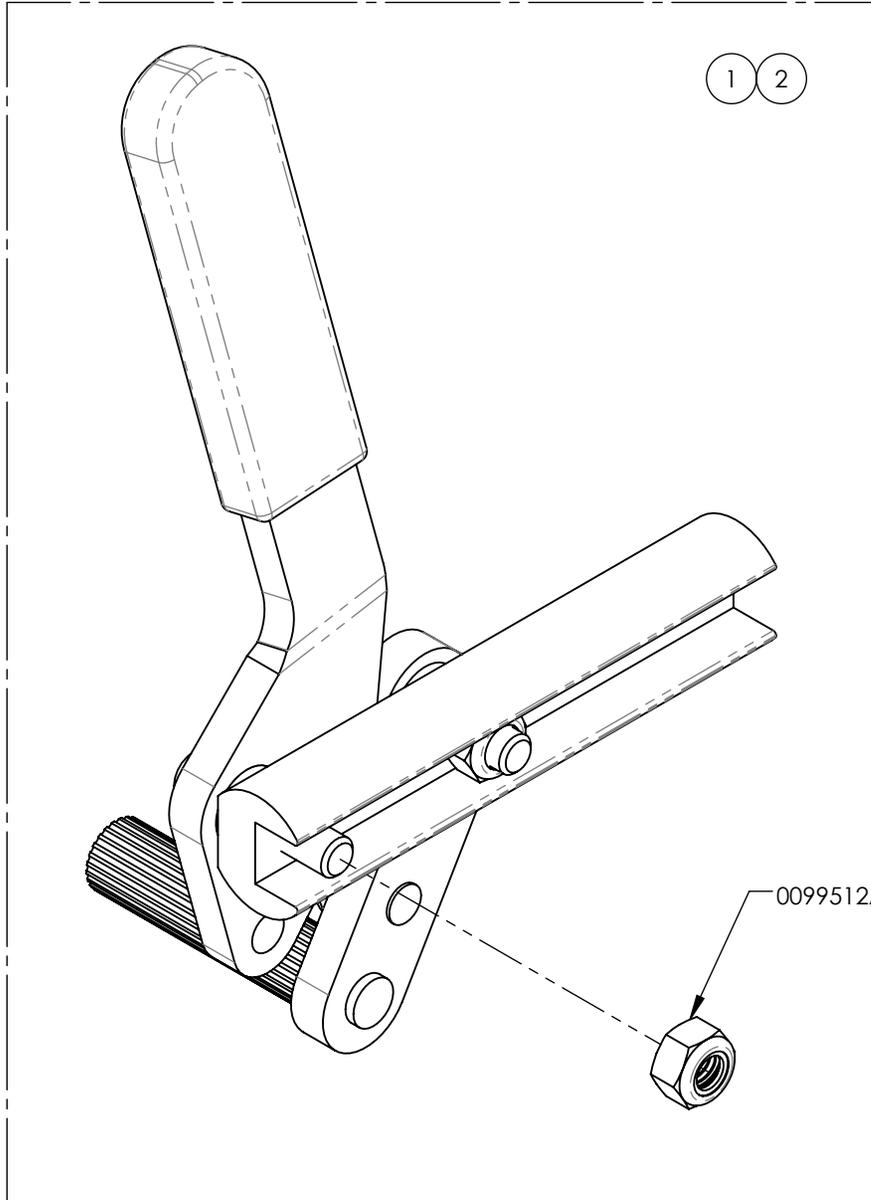

0041078A-00  
 BLOCAGE PAR TRACTION ALU, DROITE

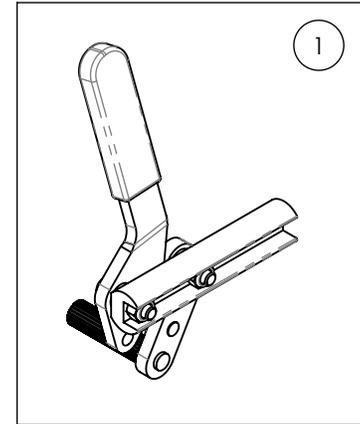


0041079A-00  
 BLOCAGE PAR TRACTION ALU, GAUCHE

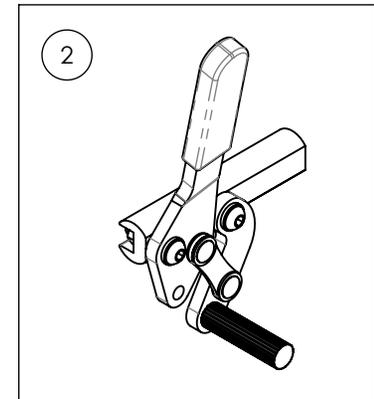


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**0041516B\_0041517B**  
**BLOCAGE POUSSÉE NEWTON V2 - ASSY**



| NO. ITEM | DESCRIPTION                              | 0041516 /QTE | 0041517 /QTE |
|----------|--|--------------|--------------|
| 1        | BLOCAGE POUSSÉE NEWTON V2, DROITE - ASSY | 1            | -            |
| 2        | BLOCAGE POUSSÉE NEWTON V2, GAUCHE - ASSY | -            | 1            |

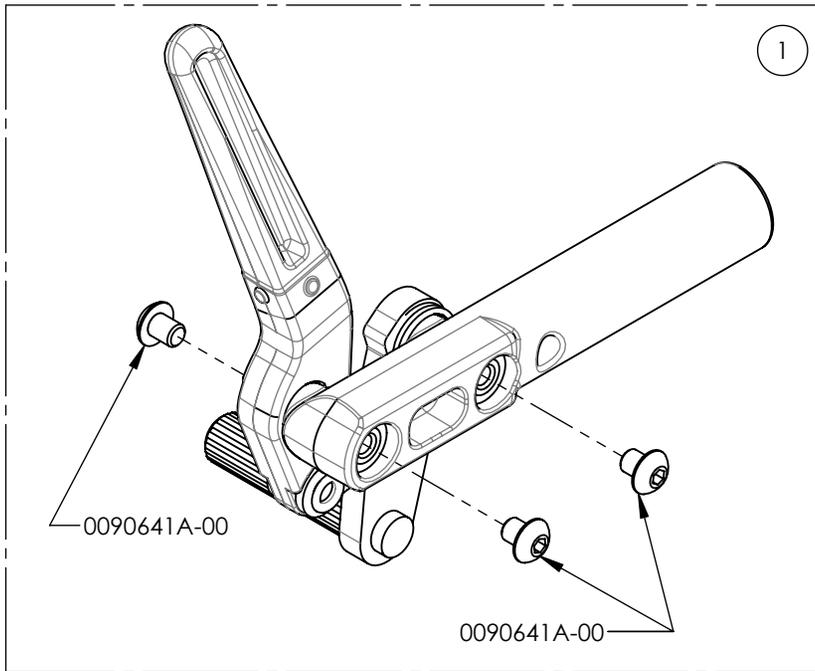

0041516B-00  
 BLOCAGE POUSSÉE NEWTON V2, DROITE - ASSY

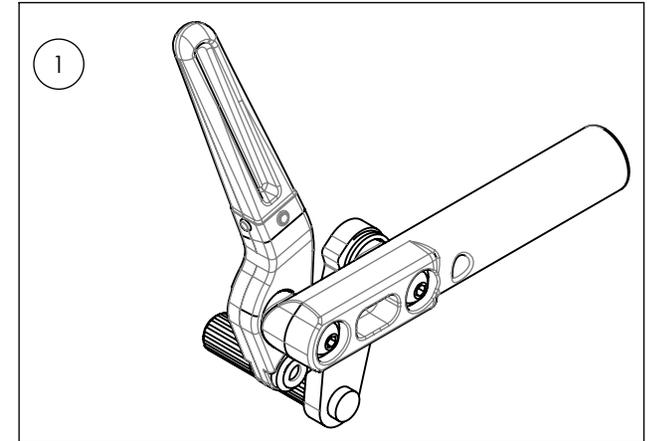


0041517B-00  
 BLOCAGE POUSSÉE NEWTON V2, GAUCHE - ASSY

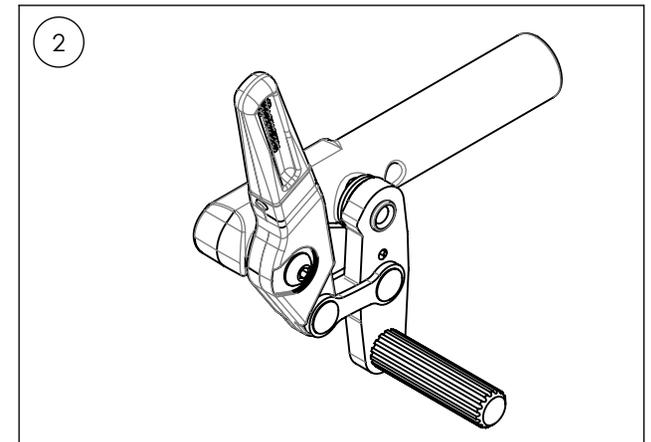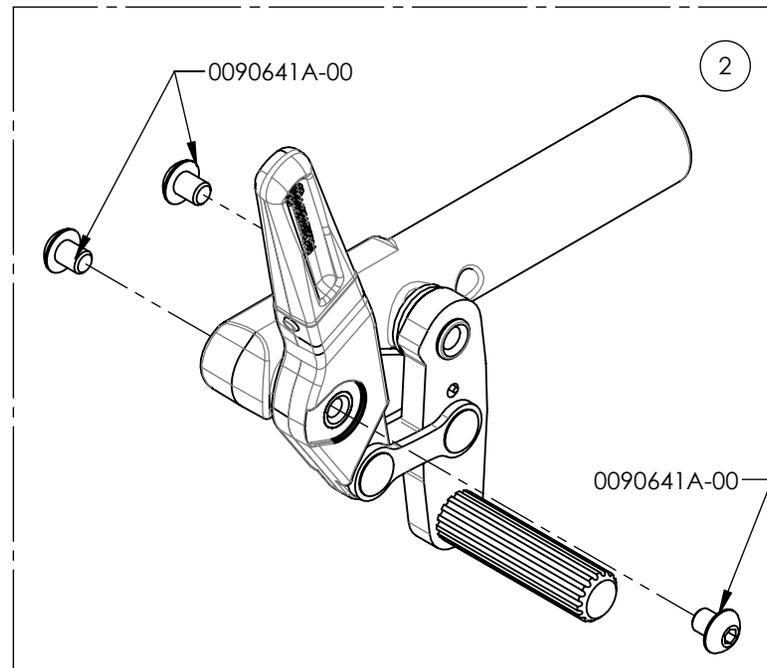


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**0041712A\_0041713A**  
**BLOCAGE PAR TRACTION ALU + RAIL ALL + RALL**


| No. ITEM | DESCRIPTION  | 0041712 /QTY. | 0041713 /QTY. | REMPLACEMENT PIÈCES/QTÉ |
|----------|--|---------------|---------------|-------------------------|
| 1        | BLOCAGE PAR TRACTION ALU + RAIL ALL + RALL, DROITE | 1             | -             | -                       |
| 2        | BLOCAGE PAR TRACTION ALU + RAIL ALL + RALL, GAUCHE | -             | 1             | -                       |
| 3        | RALLONGE LEVIER FREIN AMOVIBLE                     | -             | -             | 1                       |

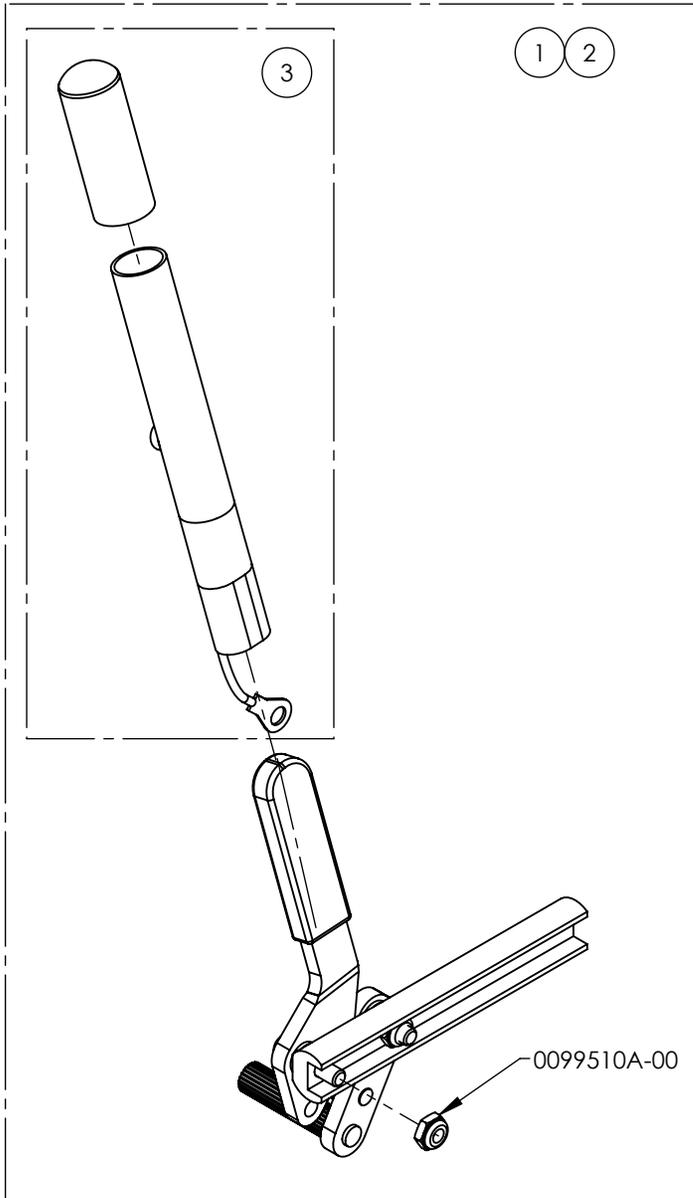

0041712A-00  
 BLOCAGE PAR TRACTION ALU +  
 RAIL ALL + RALL, DROITE

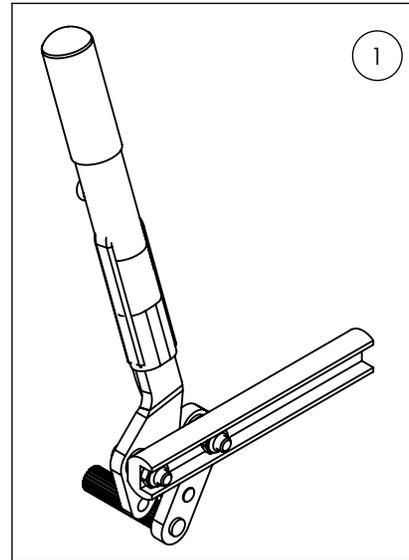


0041713A-00  
 BLOCAGE PAR TRACTION ALU +  
 RAIL ALL + RALL, GAUCHE

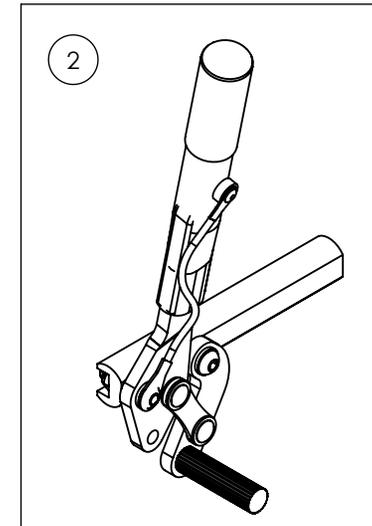


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**0041714A\_0041715A**  
**BLOCAGE PAR TRACTION ALU + RAIL ALLONGÉE**


| No. ITEM | DESCRIPTION                                      | 0041714 /QTÉ | 0041715 /QTÉ |
|----------|--|--------------|--------------|
| 1        | BLOCAGE PAR TRACTION ALU + RAIL ALLONGÉE, DROITE | 1            | -            |
| 2        | BLOCAGE PAR TRACTION ALU + RAIL ALLONGÉE, GAUCHE | -            | 1            |

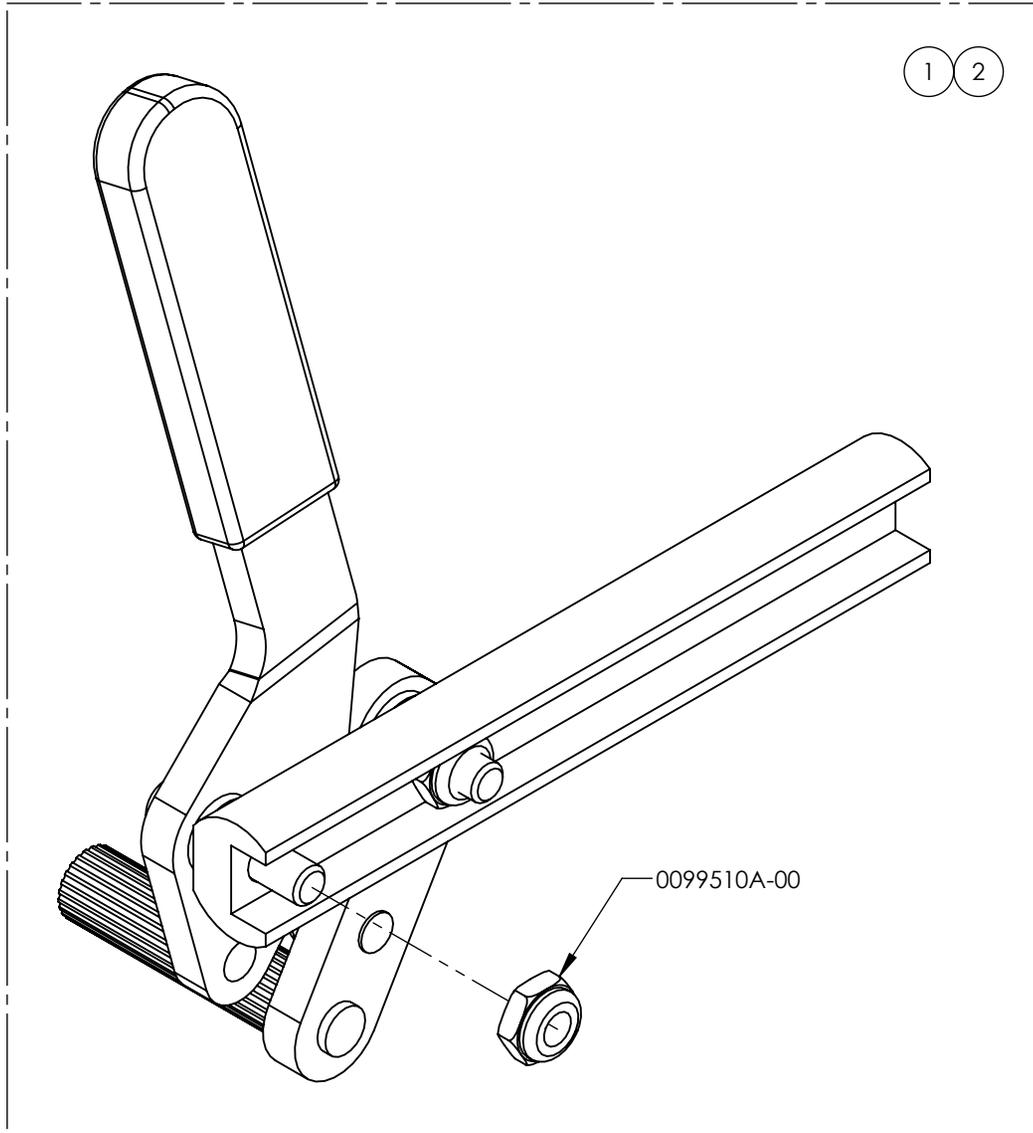

0041714A-00  
 BLOCAGE PAR TRACTION ALU +  
 RAIL ALLONGÉE, DROITE

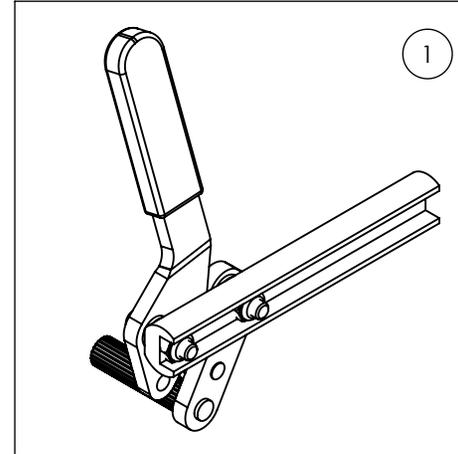



0041715A-00  
 BLOCAGE PAR TRACTION ALU +  
 RAIL ALLONGÉE, GAUCHE

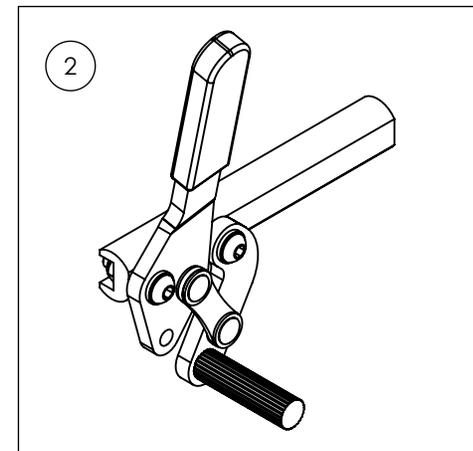

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001002A-00**  
**KIT - ADAPTATION BLOCAGE DE ROUE UNILATÉRAL 4po**



| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION              | 9001002/ QTY. |
|----------|-------------|--------------------------|---------------|
| 1        | 0041502A-00 | BAGUE 0.75-0.75po - ASSY | 2             |
| 2        | 0041028A-00 | TUBE ESPACEUR 4po LONG   | 2             |
| 3        | 0099701A-00 | BOUCHON 3/4po            | 4             |

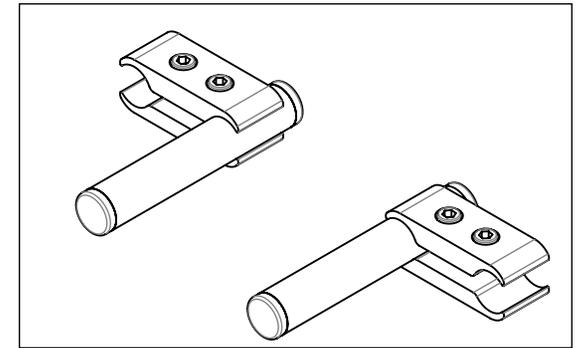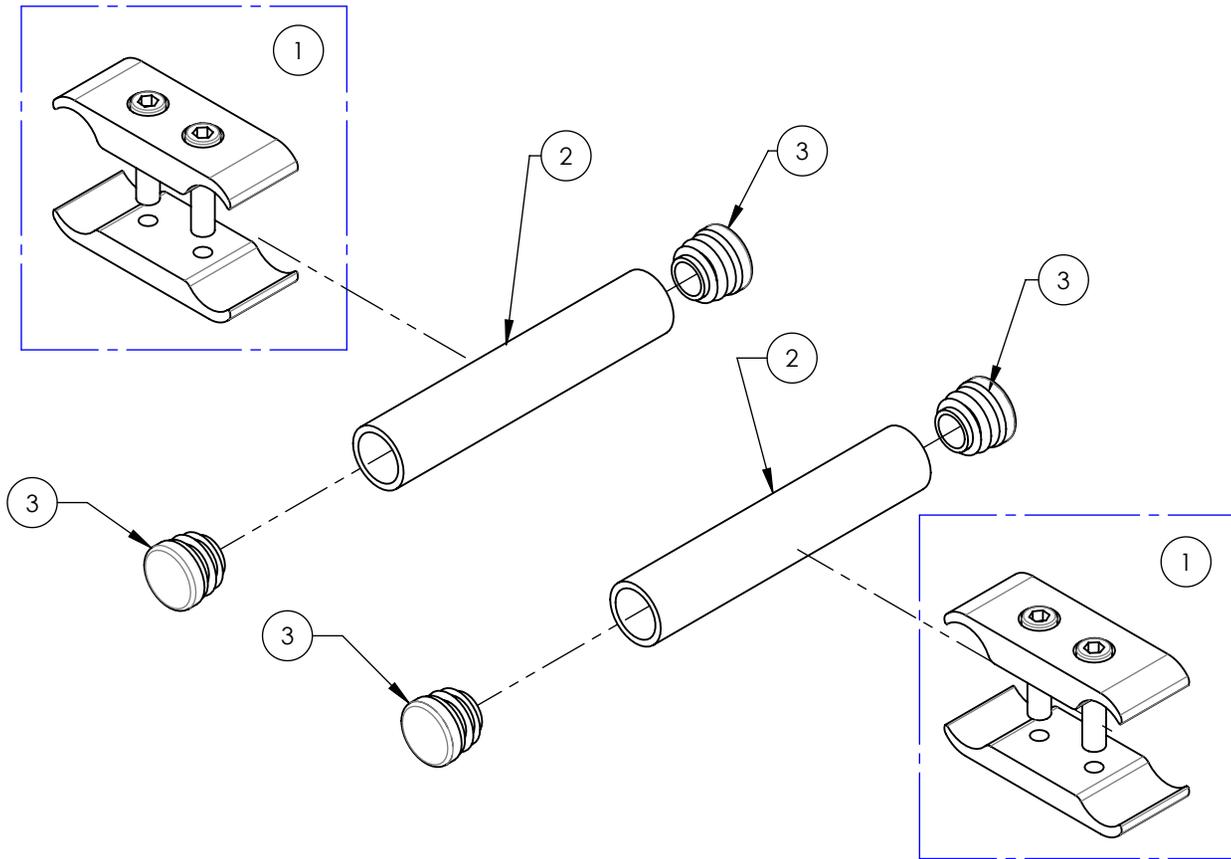

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001574A-00**  
**BLOCAGE ASSISTANT - DOSSIER STD**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                           | QTÉ |
|----------|-------------|---------------------------------------|-----|
| 1        | 0041711A-00 | BLOCAGE DE ROUE AIDANT - ASSY (PAIRE) | 1   |

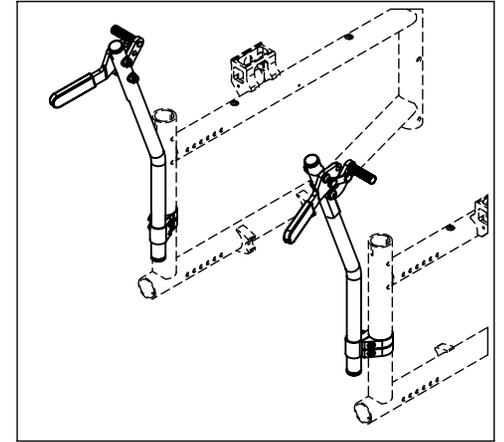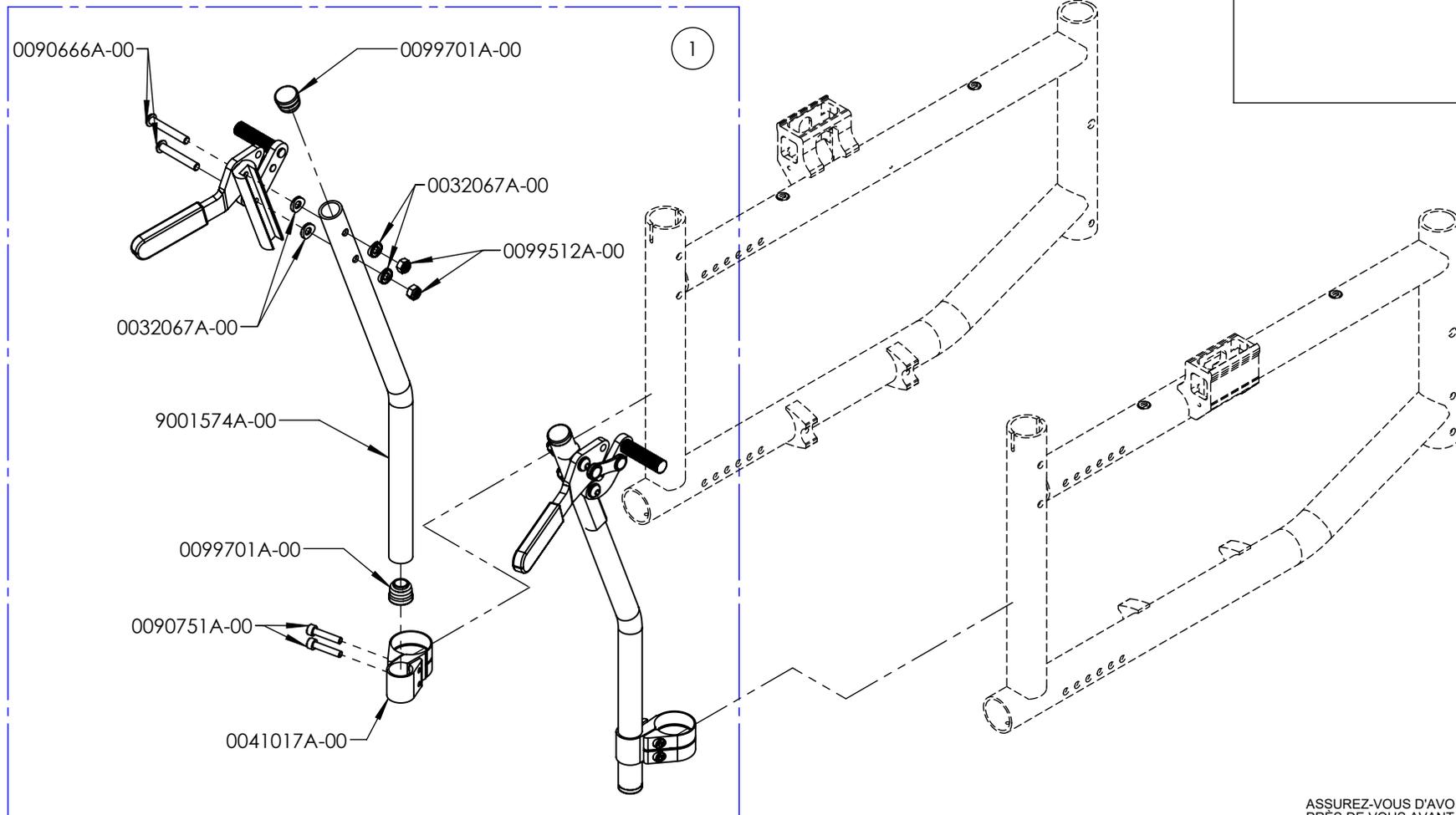


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES



**9001581A\_9001582A**

**Blocage de roue Newton - Anti-recul, par poussée**


| NO. ITEM | NO. PIÈCE   | DESCRIPTION                              | 9001581 /QTE | 9001582 /QTE |
|----------|-------------|--|--------------|--------------|
| 1        | 0041035A-00 | BLOCAGE DE ROUE ANTI-RECU, DROIT - ASSY  | 1            | -            |
| 2        | 0041036A-00 | BLOCAGE DE ROUE ANTI-RECU, GAUCHE - ASSY | -            | 1            |

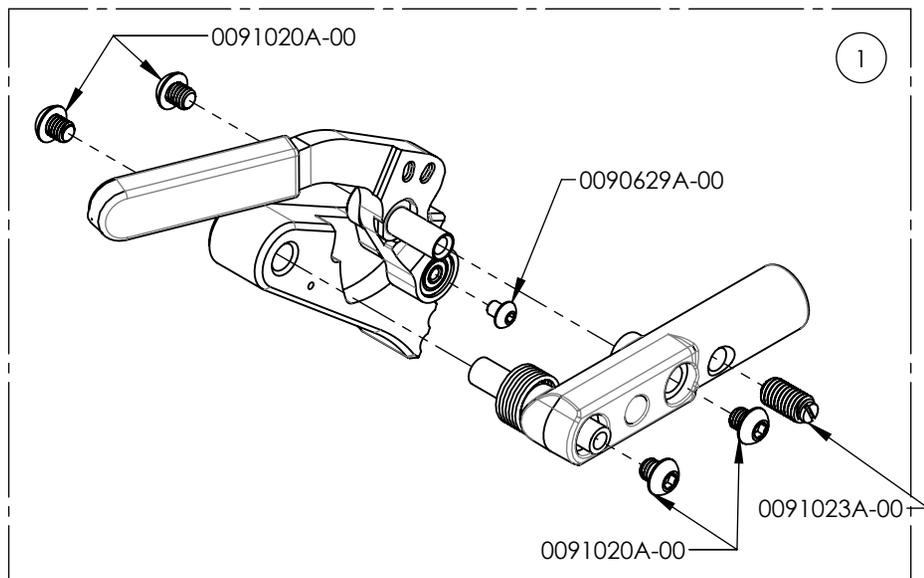

9001581A-00  
BLOCAGE ANTI-RECU - NEWTON,  
DROITE

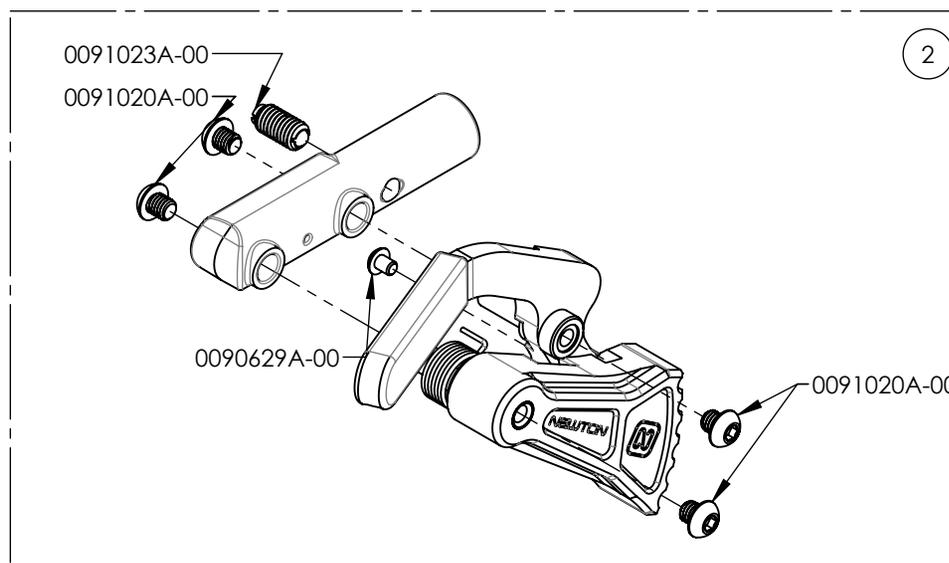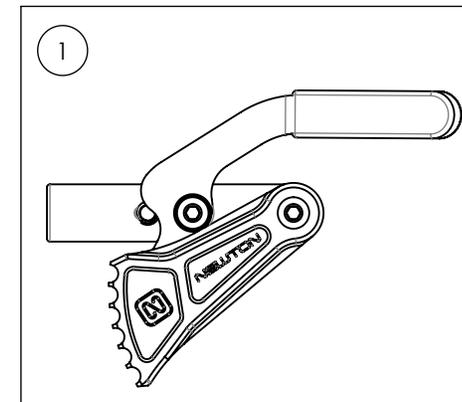


9001582A-00  
BLOCAGE ANTI-RECU - NEWTON,  
GAUCHE

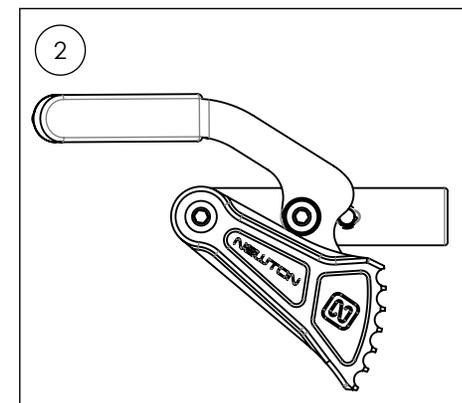



ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001583A\_9001584A**  
**BLOCAGE DE ROUE NEWTON - ANTI-RECUL, PAR POUSSÉE,**  
**AVEC RALLONGE DE LEVIER AMOVIBLE 6 po**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                               | 9001583 | 9001584 |
|----------|-------------|---|---------|---------|
| 1        | 0041035A-00 | BLOCAGE DE ROUE ANTI-RECUL, DROIT - ASSY  | 1       | -       |
| 2        | 0041036A-00 | BLOCAGE DE ROUE ANTI-RECUL, GAUCHE - ASSY | -       | 1       |
| 3        | 0041005A-00 | RALLONGE LEVIER FREIN AMOVIBLE            | 1       | 1       |

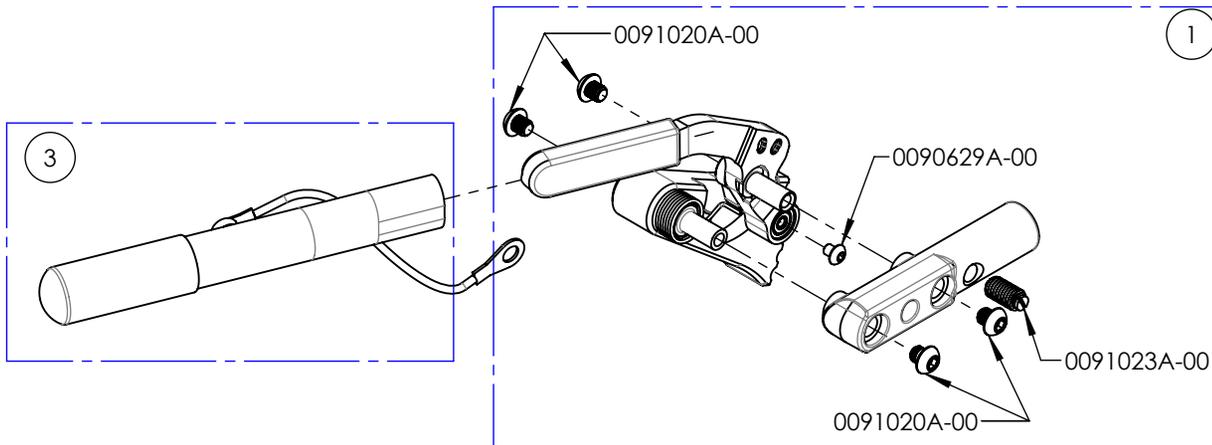

9001583A-00  
 BLOCAGE ANTI-RECUL - NEWTON,  
 RALLONGE, DROITE

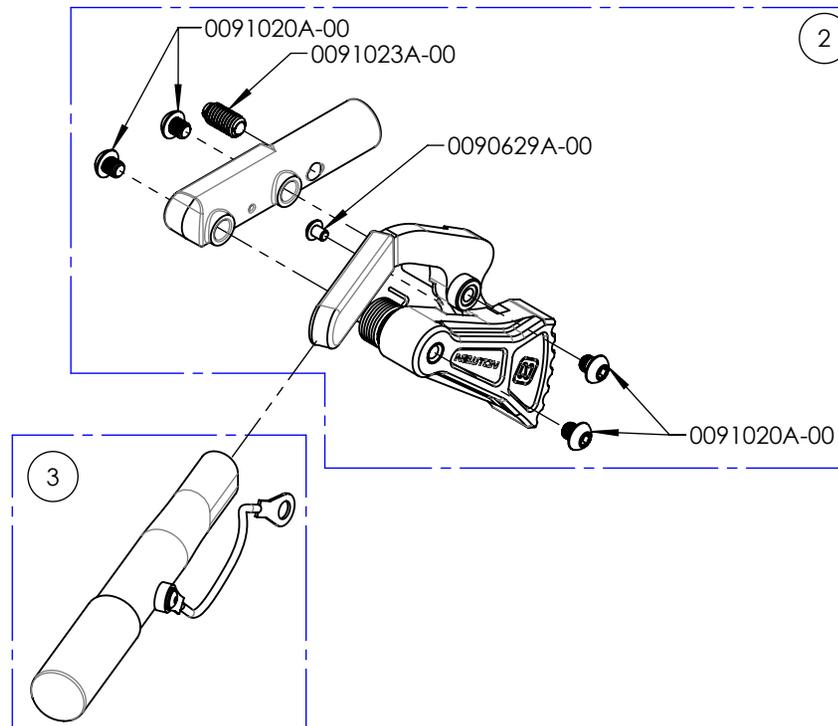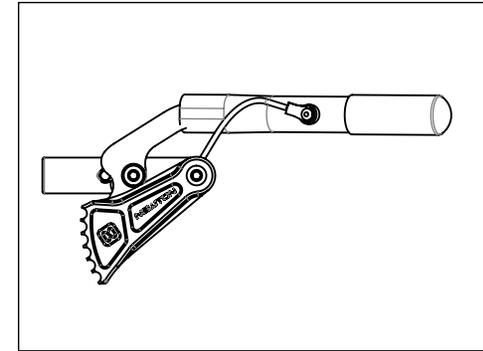


9001584A-00  
 BLOCAGE ANTI-RECUL - NEWTON, RALLONGE,  
 GAUCHE

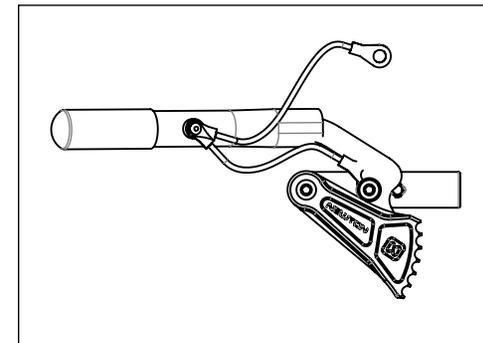



ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9003029A\_9003030A**  
**BLOCAGE ANTI-RECU - NEWTON, RAIL ALLONGÉ**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                             | 9003029 | 9003030 | EXTRA |
|----------|-------------|---|---------|---------|-------|
| 1        | 0041514A-00 | ANTI-RECU NEWTON & LR, DROITE - ASSY    | 1       | -       | -     |
| 2        | 0041515A-00 | ANTI-RECU NEWTON & LR, GAUCHE - ASSY    | -       | 1       | -     |
| 3        | 0099701A-00 | BOUCHON 3/4po                           | 1       | 1       | -     |
| 4        | 0041075A-00 | RAIL DE FREIN ANTI RECU NEWTON ALLONGÉE | -       | -       | 1     |

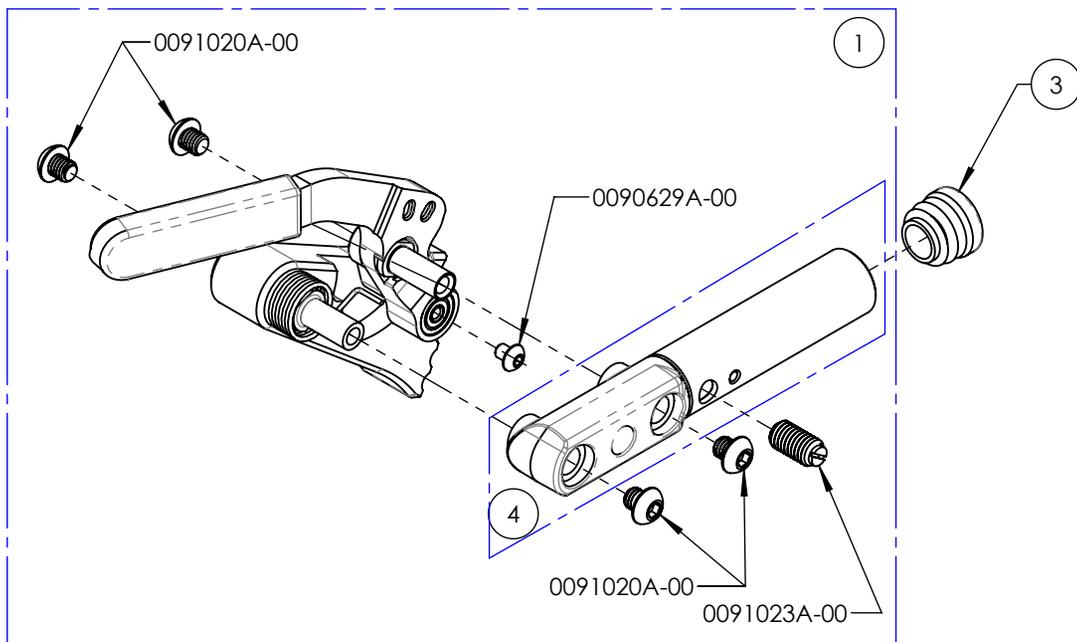

9003029A-00  
 BLOCAGE ANTI-RECU - NEWTON, RAIL  
 ALLONGÉ, DROITE

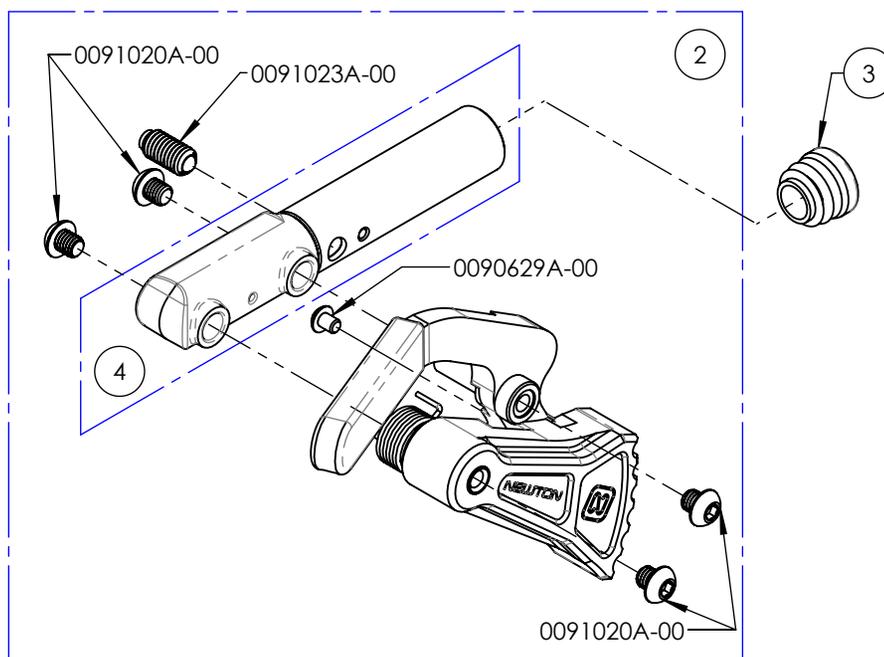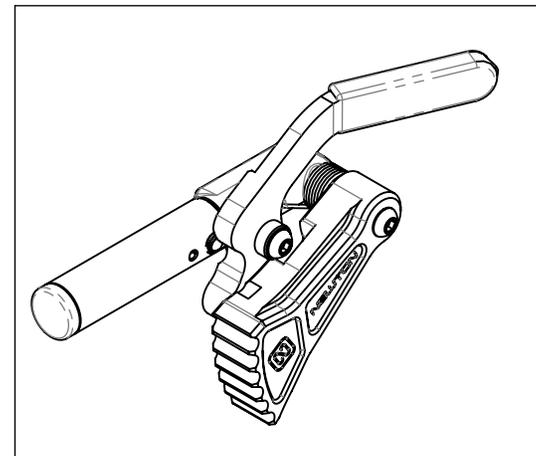


9003030A-00  
 BLOCAGE ANTI-RECU - NEWTON, RAIL  
 ALLONGÉ, GAUCHE

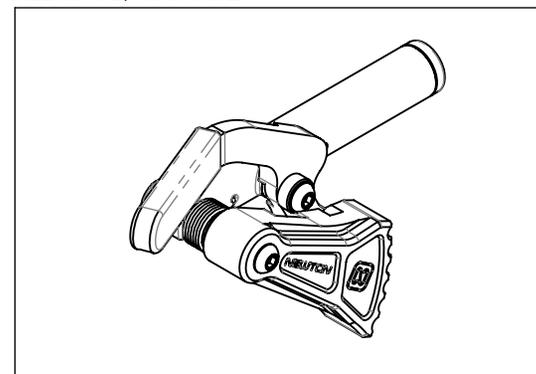


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9003031A 9003032A**  
**BLOCAGE ANTI-RECU - NEWTON, LR, RALLONGE**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                             | 9003031 | 9003032 | EXTRA |
|----------|-------------|---|---------|---------|-------|
| 1        | 0041514A-00 | ANTI-RECU NEWTON & LR, DROITE - ASSY    | 1       | -       | -     |
| 2        | 0041515A-00 | ANTI-RECU NEWTON & LR, GAUCHE - ASSY    | -       | 1       | -     |
| 3        | 0099701A-00 | BOUCHON 3/4po                           | 1       | 1       | -     |
| 4        | 0041005A-00 | RALLONGE LEVIER FREIN AMOVIBLE          | 1       | 1       | -     |
| 5        | 0041075A-00 | RAIL DE FREIN ANTI RECU NEWTON ALLONGÉE | -       | -       | 1     |

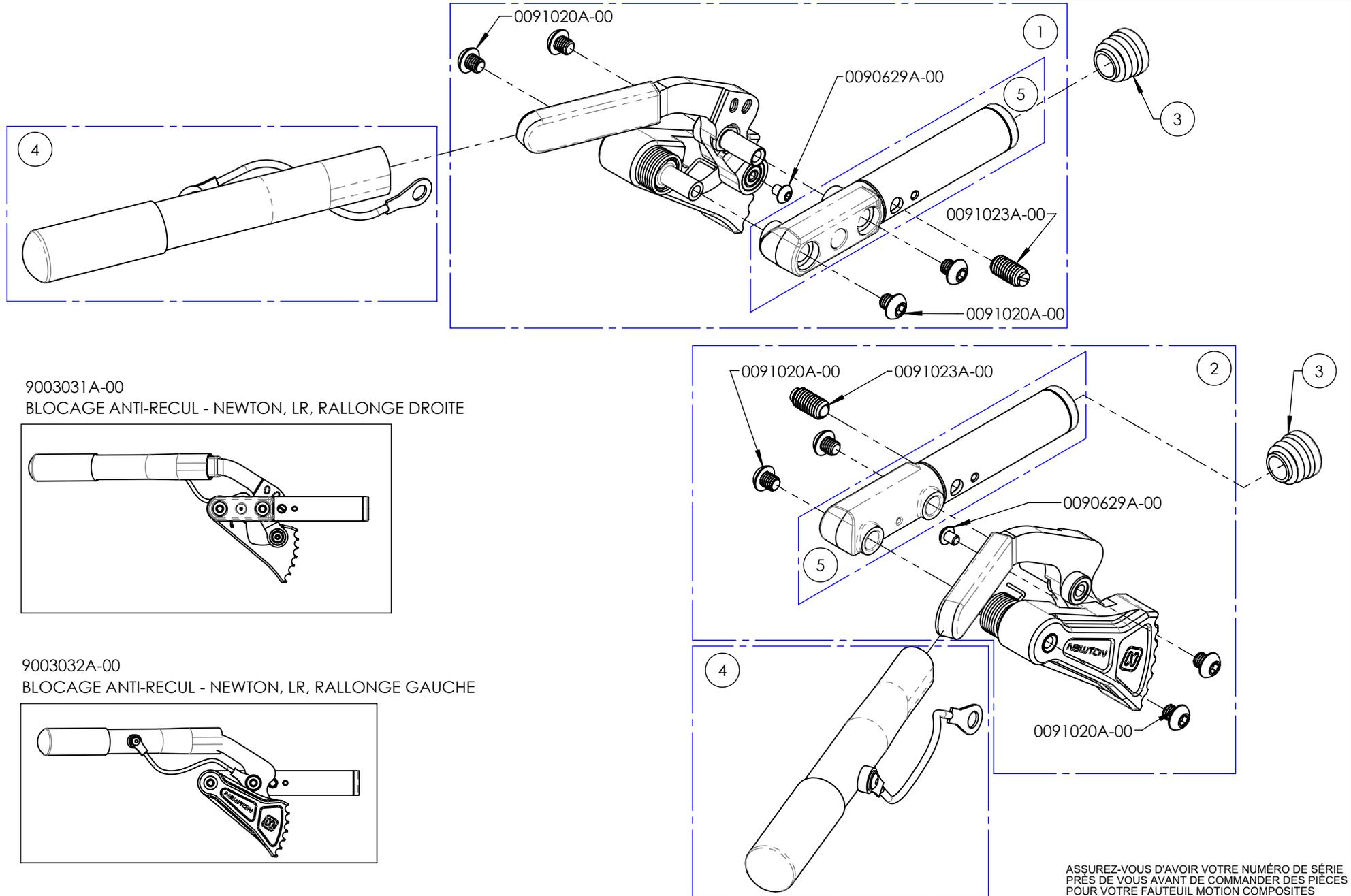

9003031A-00  
 BLOCAGE ANTI-RECU - NEWTON, LR, RALLONGE DROITE

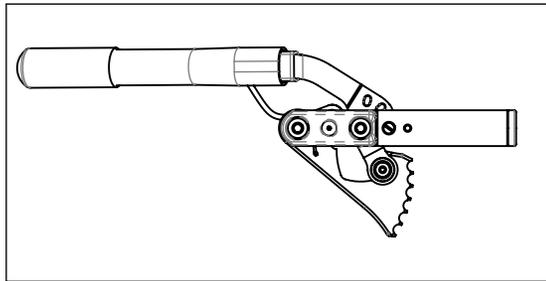



9003032A-00  
 BLOCAGE ANTI-RECU - NEWTON, LR, RALLONGE GAUCHE

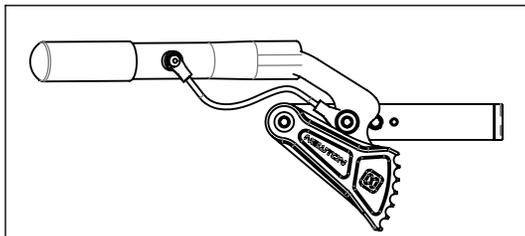

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9003048A-00**  
**BAGUE - BUTÉE D'APPUI-PIED**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                             | QTÉ |
|----------|-------------|---|-----|
| 1        | 0041120A-00 | BUTÉE BLOCAGE DE FREIN                  | 1   |
| 2        | 0060201A-00 | FRAME SAVER 1¼po                        | 1   |
| 3        | 0090777A-00 | VIS TÊTE CYLIND M6x1x45mm L, 24mm FILET | 1   |

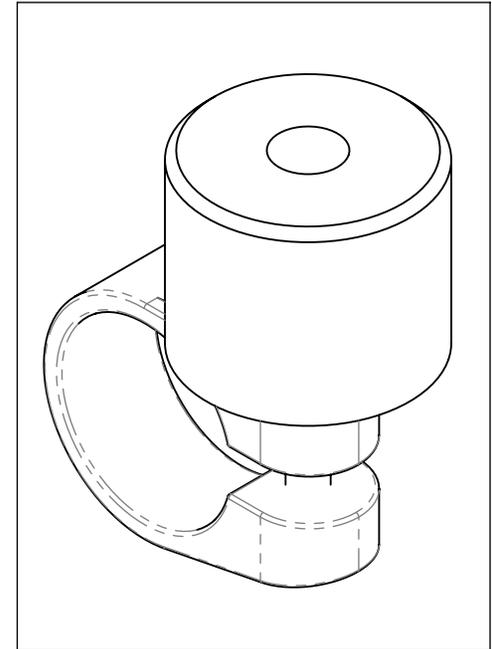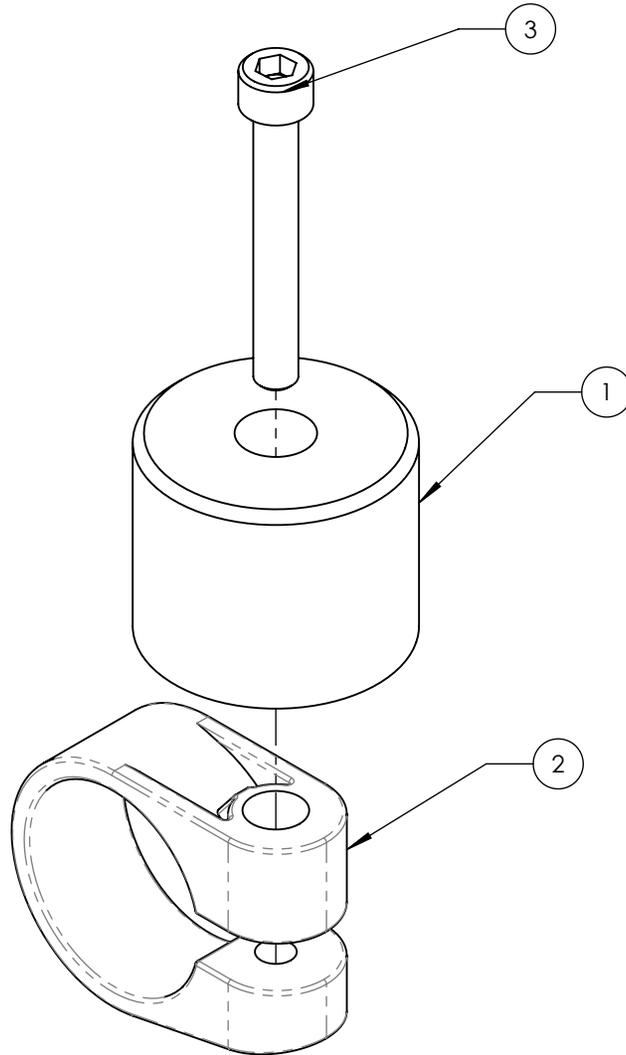

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue de blocages de roue**  
**Kit de blocage de roue pour assistant**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                     | QTÉ |
|----------|-------------|---------------------------------|-----|
| 1        | 9001574A-00 | BLOCAGE ASSISTANT - DOSSIER STD | 1   |

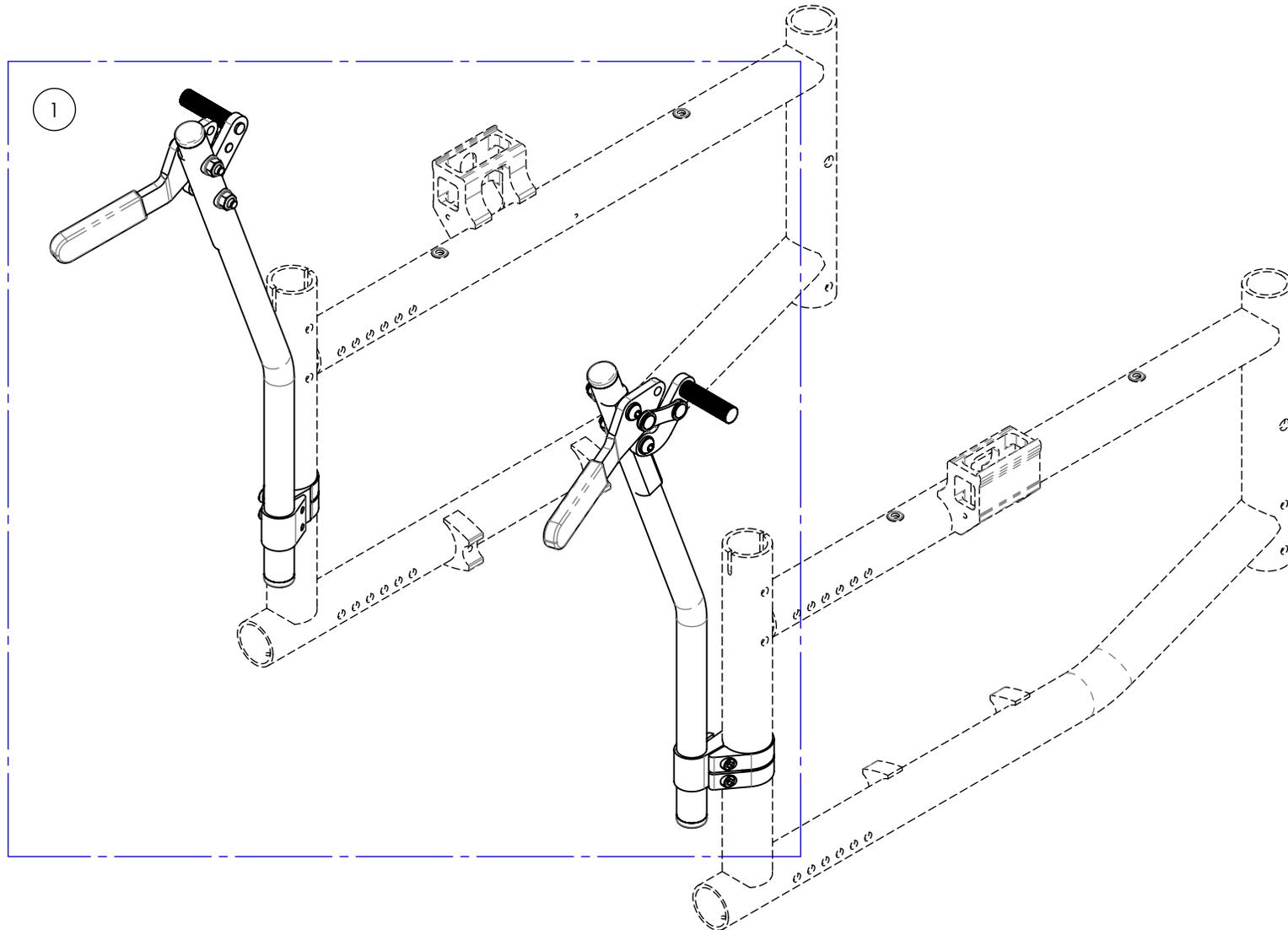


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


**Catalogue blocages de roue**  
**Blocage de roue - Bagues**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                 | QTÉ |
|----------|-------------|-----------------------------|-----|
| 1        | 9001212A-00 | BAGUE - ULTRA-LÉGÈRE        | 1   |
| 2        | 0041501A-00 | BAGUE DE FREIN - ASSEMBLAGE | 1   |

**FOR ALUMINUM FRAME**

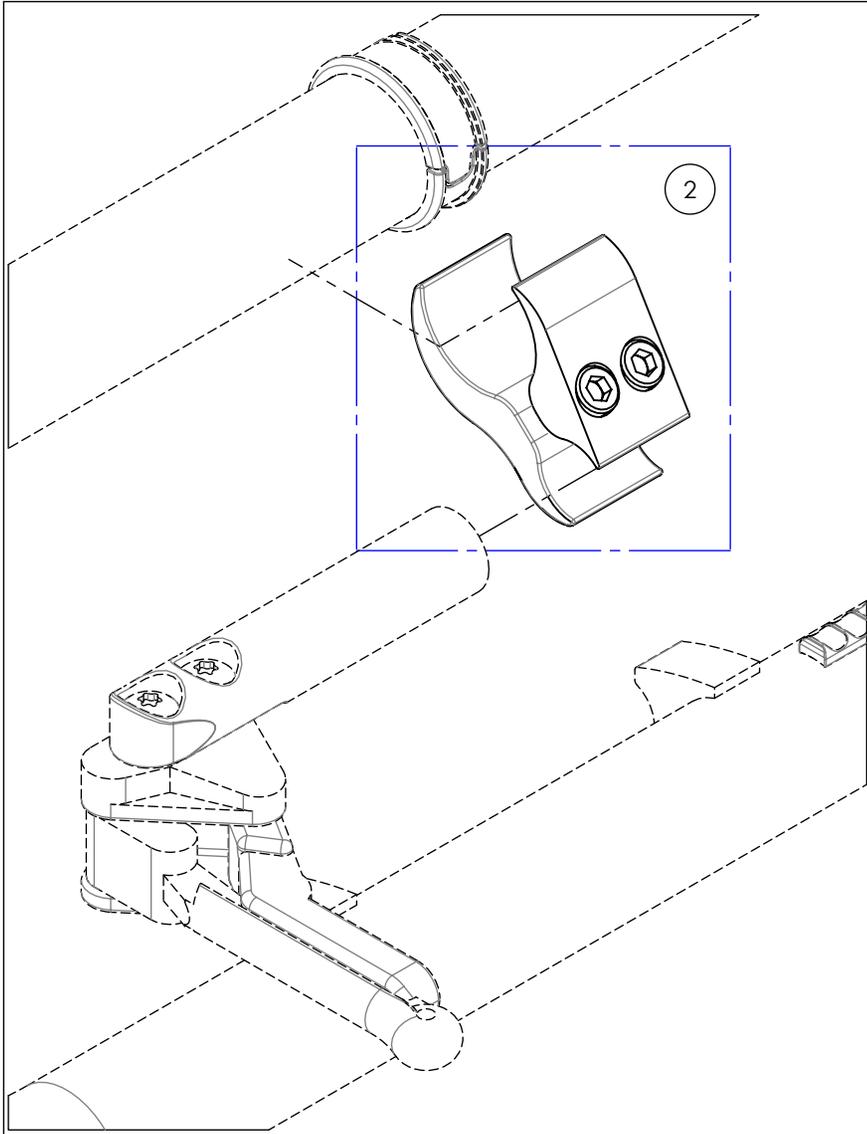

**FOR CARBON FRAME**


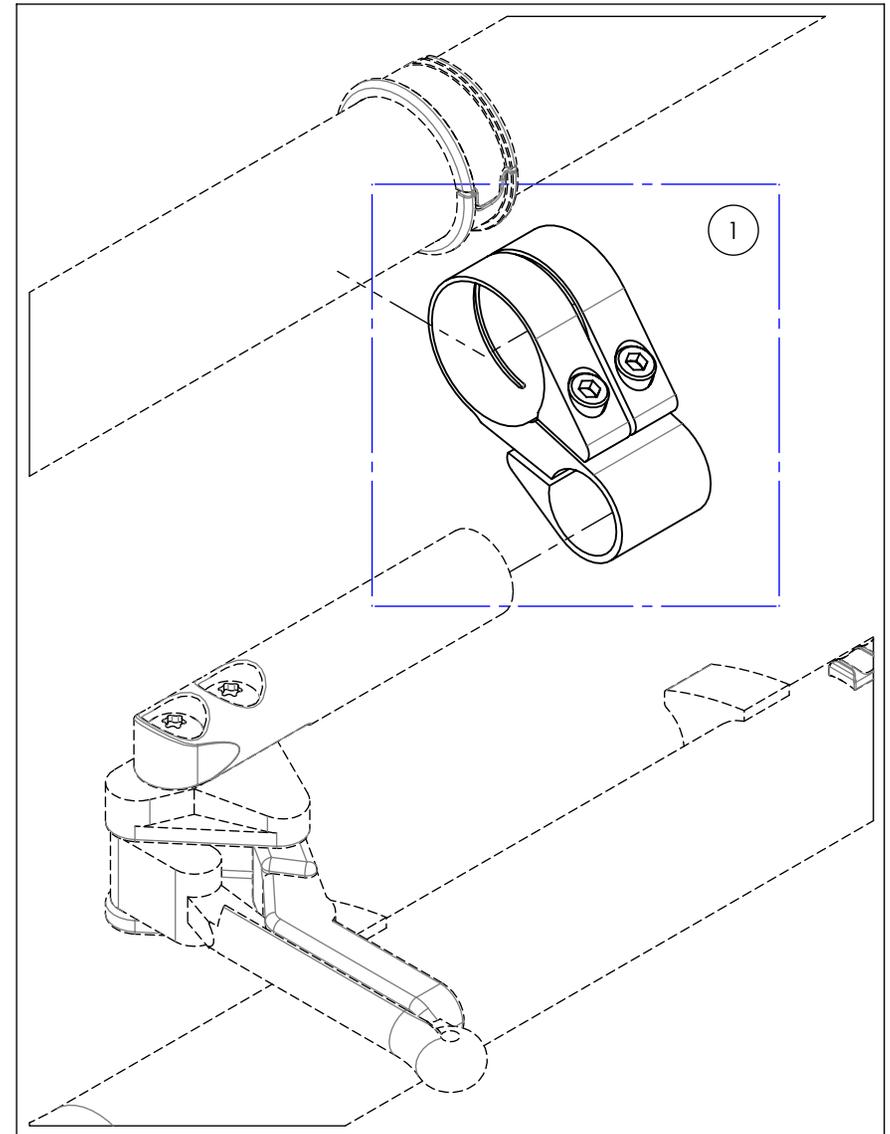


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


**Catalogue de blocages de roue**  
**Butée d'appui-pied**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                | QTÉ |
|----------|-------------|----------------------------|-----|
| 1        | 9003048A-00 | BAGUE - BUTÉE D'APPUI-PIED | 2   |

**INSTALLATION DES BUTÉES**  
**POUR CADRE TYPE 1**

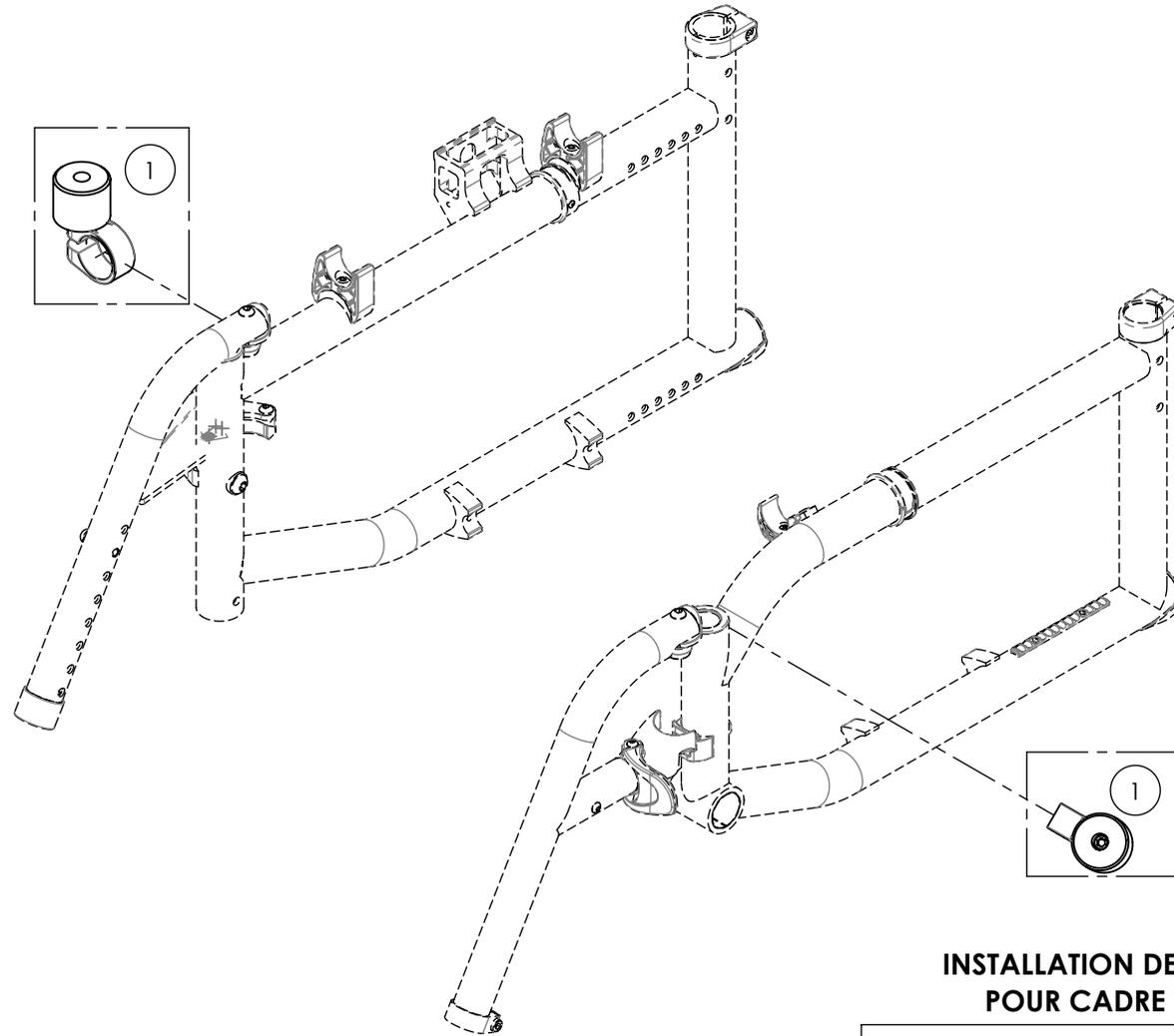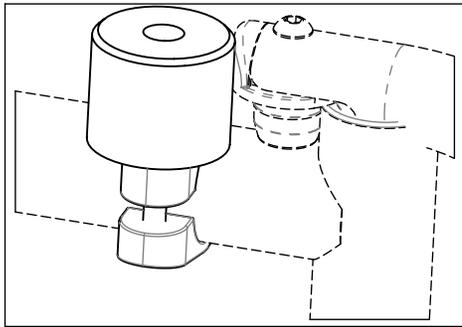





**INSTALLATION DES BUTÉES**  
**POUR CADRE TYPE 2**

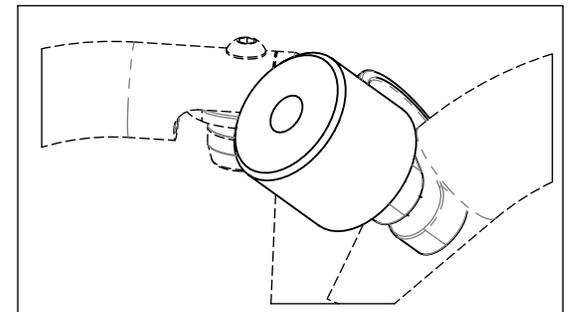

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES





**Catalogue de blocages de roue**  
**Blocage de roue - Anti-recul à rail allongé**

| No ITEM | No PIÈCE    | DESCRIPTION                                      | QTÉ |
|---------|-------------|--|-----|
| 1       | 9003029A-00 | BLOCAGE ANTI-RECU - NEWTON, RAIL ALLONGÉ, DROITE | 1   |
| 2       | 9003030A-00 | BLOCAGE ANTI-RECU - NEWTON, RAIL ALLONGÉ, GAUCHE | 1   |
| 3       | 9003031A-00 | BLOCAGE ANTI-RECU - NEWTON, LR, RALLONGE DROITE  | 1   |
| 4       | 9003032A-00 | BLOCAGE ANTI-RECU - NEWTON, LR, RALLONGE GAUCHE  | 1   |

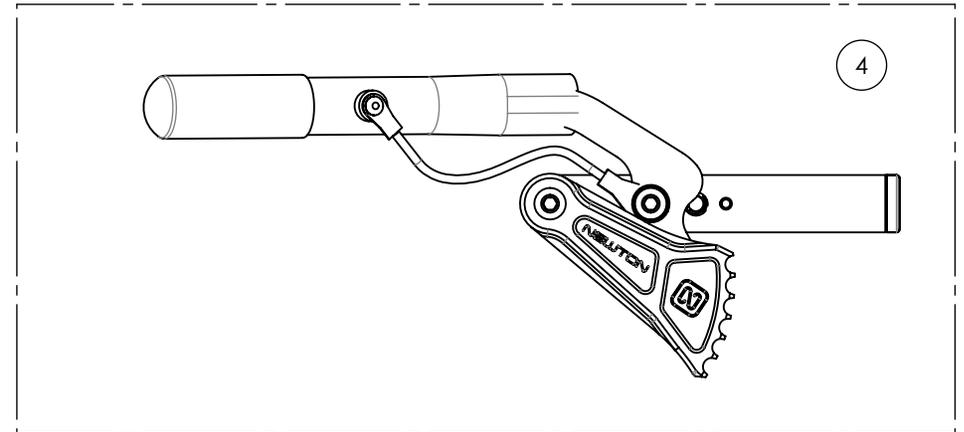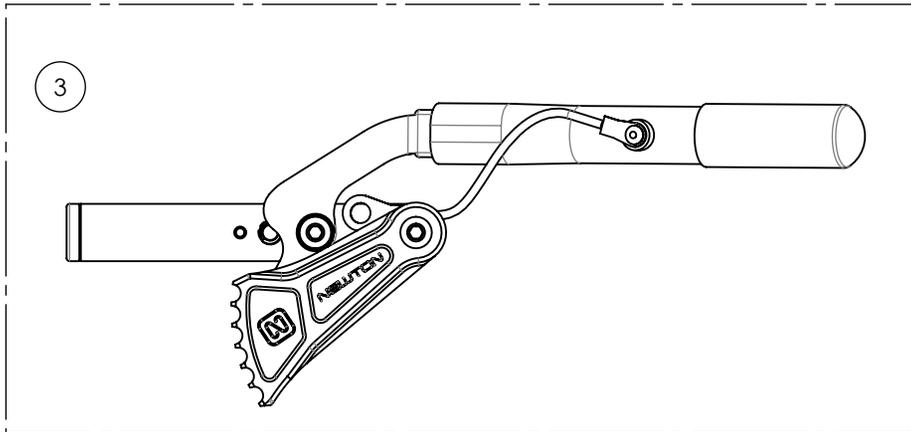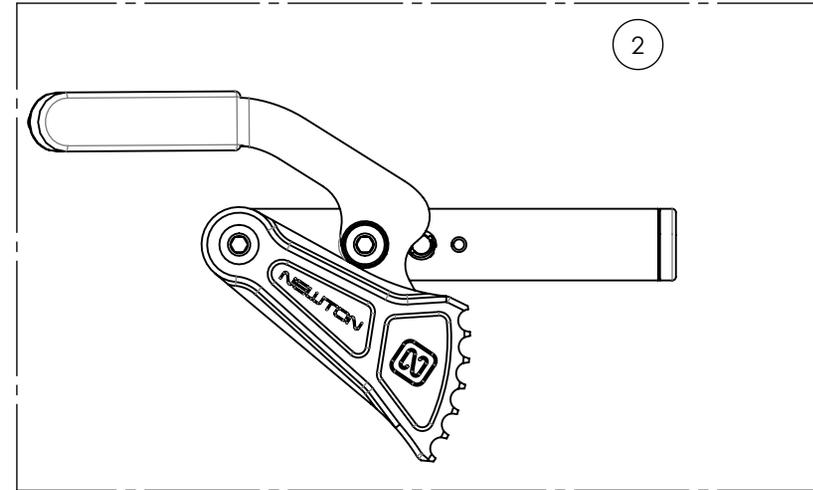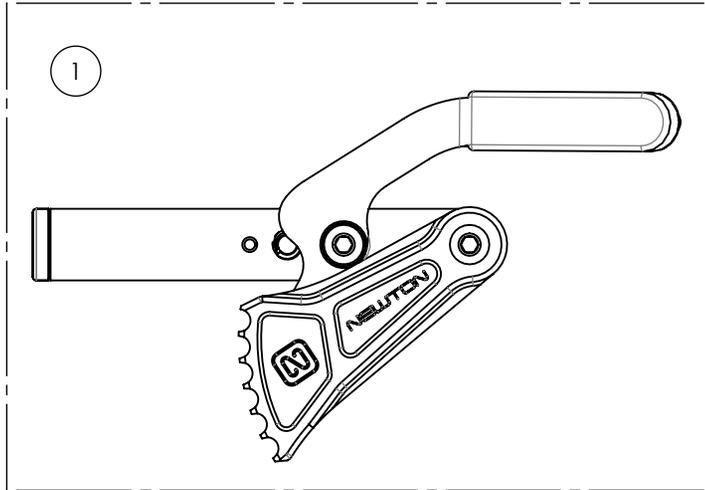

**Catalogue de blocages de roue**  
**Blocage de roue - Anti-recul**

| No ITEM | No PIÈCE    | DESCRIPTION                                  | QTÉ |
|---------|-------------|--|-----|
| 1       | 9001581A-00 | BLOCAGE ANTI-RECU - NEWTON, DROITE           | 1   |
| 2       | 9001582A-00 | BLOCAGE ANTI-RECU - NEWTON, GAUCHE           | 1   |
| 3       | 9001583A-00 | BLOCAGE ANTI-RECU - NEWTON, RALLONGE, DROITE | 1   |
| 4       | 9001584A-00 | BLOCAGE ANTI-RECU - NEWTON, RALLONGE, GAUCHE | 1   |



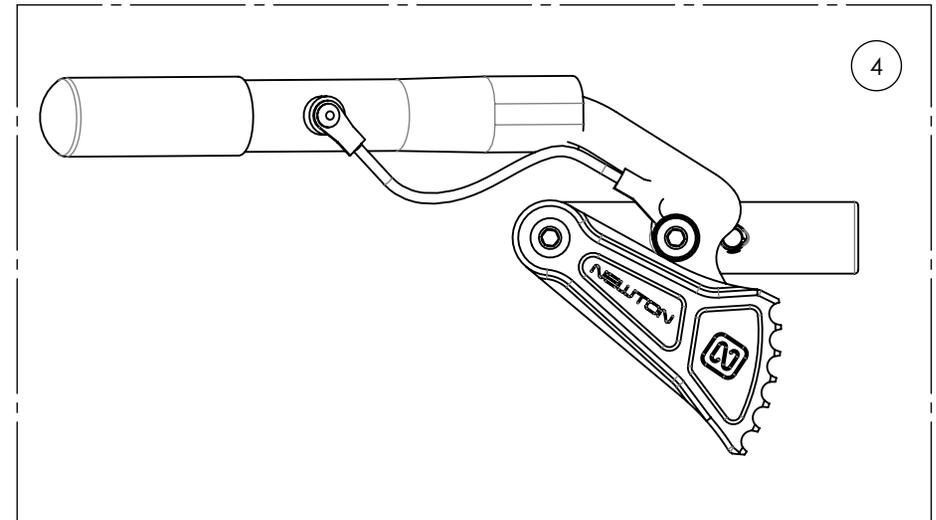
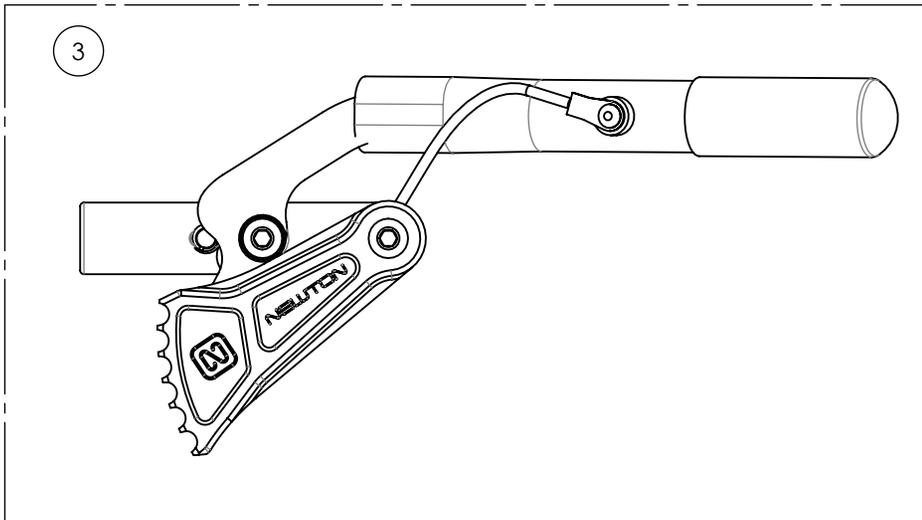
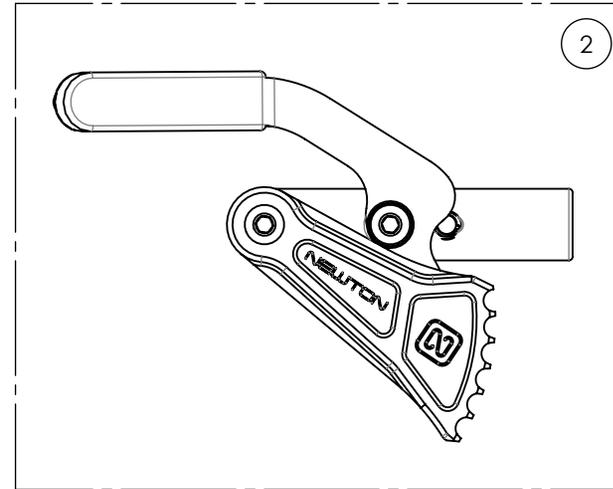
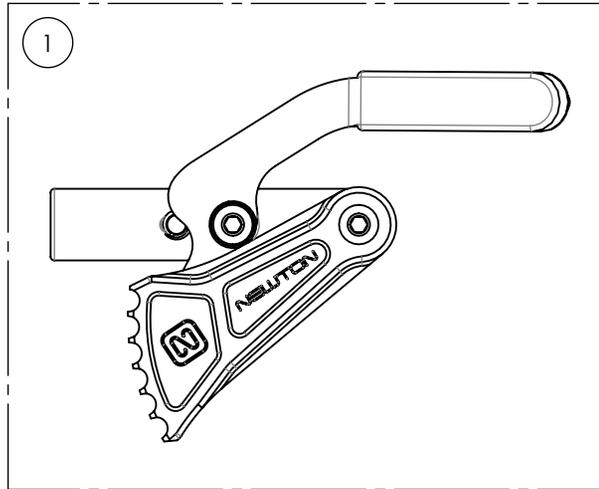


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue de blocages de roue**  
**Blocage de roue - Par poussée & par traction**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                       | QTÉ |
|----------|-------------|---|-----|
| 1        | 0041057A-00 | BLOCAGE DE ROUE NEWTON PAR POUSSÉE, DROIT - ASSY  | 1   |
| 2        | 0041056A-00 | BLOCAGE DE ROUE NEWTON PAR POUSSÉE, GAUCHE - ASSY | 1   |
| 3        | 0041052A-00 | BLOCAGE POUSSÉE NEWTON & RALL, DROITE - ASSY      | 1   |
| 4        | 0041051A-00 | BLOCAGE POUSSÉE NEWTON & RALL, GAUCHE - ASSY      | 1   |
| 5        | 0041078A-00 | BLOCAGE PAR TRACTION ALU, DROITE                  | 1   |
| 6        | 0041079A-00 | BLOCAGE PAR TRACTION ALU, GAUCHE                  | 1   |
| 7        | 0041080A-00 | BLOCAGE PAR TRACTION ALU + RALLONGE, DROITE       | 1   |
| 8        | 0041081A-00 | BLOCAGE PAR TRACTION ALU + RALLONGE, GAUCHE       | 1   |
| 9        | 0041002A-00 | FREIN BLOCAGE POUSSÉE (PAIRE)                     | 1   |
| 10       | 0041013A-00 | BLOCAGE PAR POUSSÉE ALU + RALLONGE (PAIRE)        | 1   |

**REPLACÉ PAR**  
**#0041056A-00 & #0041057A-00**

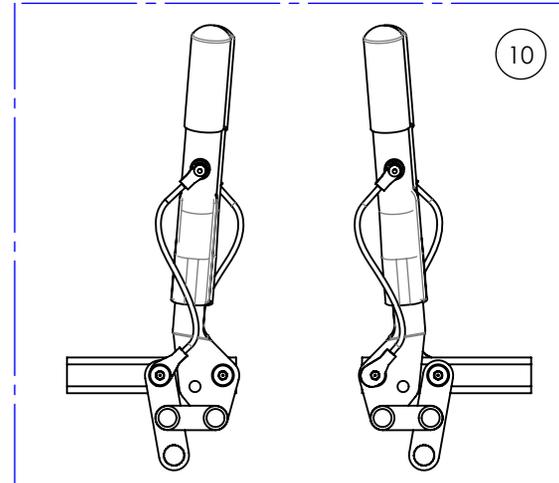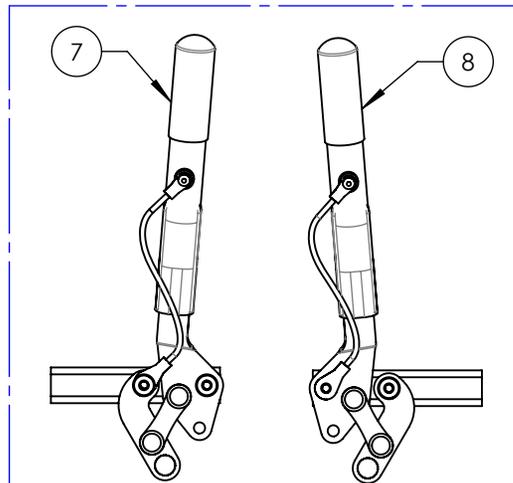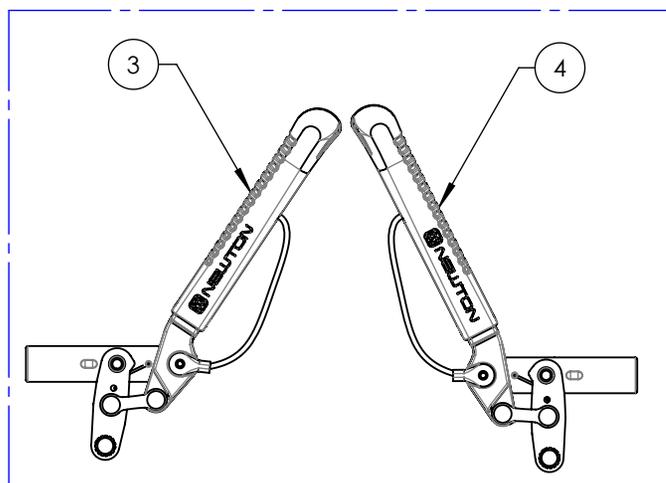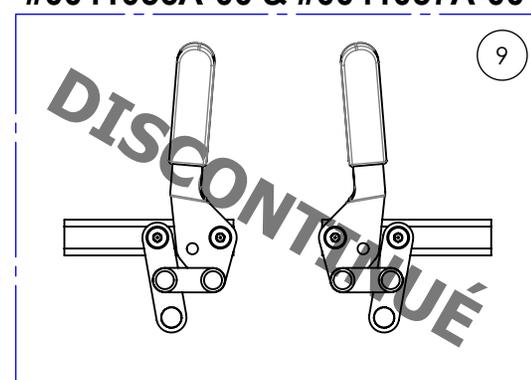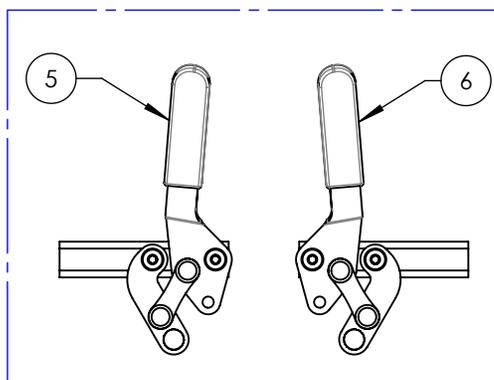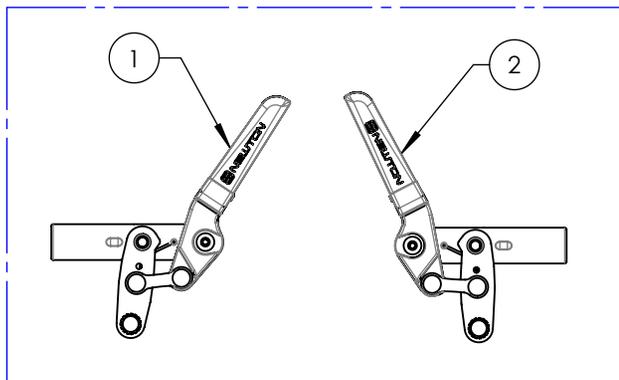






**Note interne seulement pour 0041013A-00**

- Si besoin 1 côté charger la paire -50%
- Remplacement sous garantie donner paire

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue de blocages de roue**  
**Blocage de roue - Par poussée et traction à rail allongée**



| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION  | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 1        | 0041516B-00 | BLOCAGE PAR POUSSÉE - NEWTON, RAIL LONGUE, DROITE  | 1   |
| 2        | 0041517B-00 | BLOCAGE PAR POUSSÉE - NEWTON, RAIL LONGUE, GAUCHE  | 1   |
| 3        | 0041076B-00 | BLOCAGE PAR POUSSÉE - NEWTON, LR, RALLONGE, DROITE | 1   |
| 4        | 0041077B-00 | BLOCAGE PAR POUSSÉE - NEWTON, LR, RALLONGE, GAUCHE | 1   |
| 5        | 0041714A-00 | BLOCAGE PAR TRACTION ALU + RAIL ALLONGÉE, DROITE   | 1   |
| 6        | 0041715A-00 | BLOCAGE PAR TRACTION ALU + RAIL ALLONGÉE, GAUCHE   | 1   |
| 7        | 0041712A-00 | BLOCAGE PAR TRACTION ALU + RAIL ALL + RALL, DROITE | 1   |
| 8        | 0041713A-00 | BLOCAGE PAR TRACTION ALU + RAIL ALL + RALL, GAUCHE | 1   |
| 9        | 0041503A-00 | BLOCAGE PAR POUSSÉE ALU + RAIL ALL + RALL          | 1   |

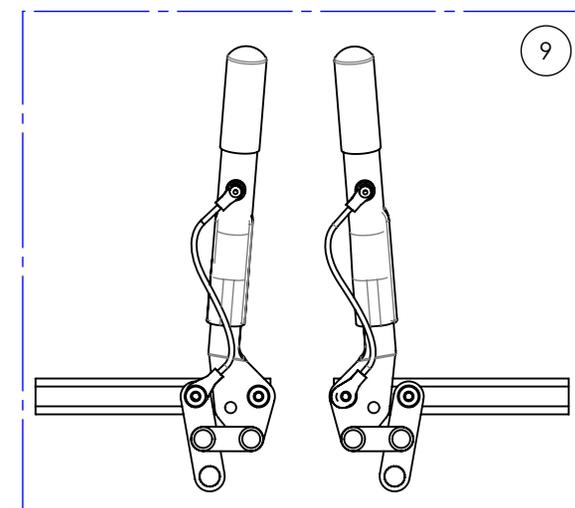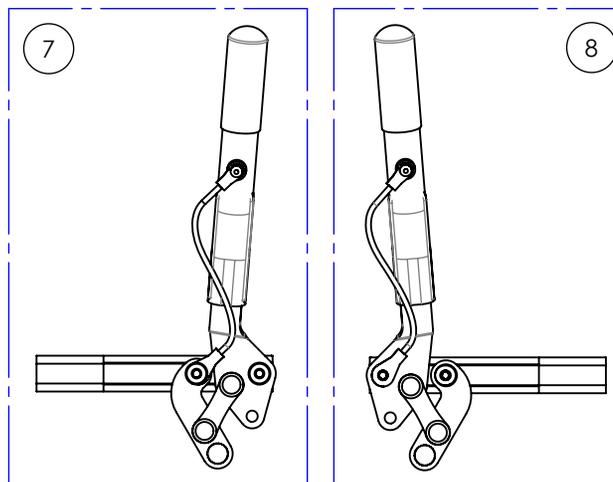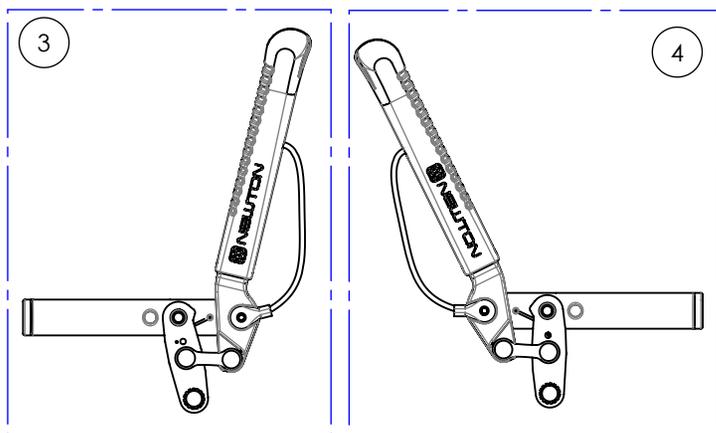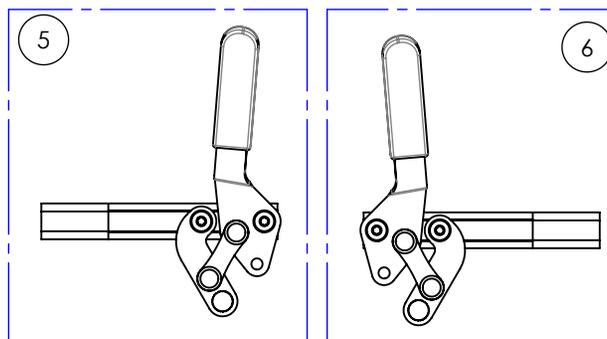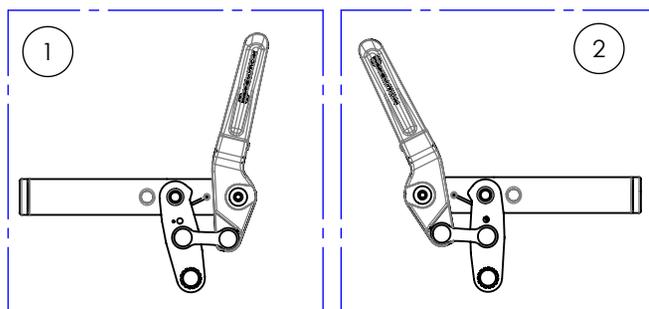

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue de blocages de roue**  
**Blocage de roue - Ciseaux**


| No ITEM | No PIÈCE    | DESCRIPTION                         | QTÉ |
|---------|-------------|-------------------------------------|-----|
| 1       | 0041123A-00 | BLOCAGE DE ROUE CISEAUX MBL, DROITE | 1   |
| 2       | 0041122A-00 | BLOCAGE DE ROUE CISEAUX MBL, GAUCHE | 1   |

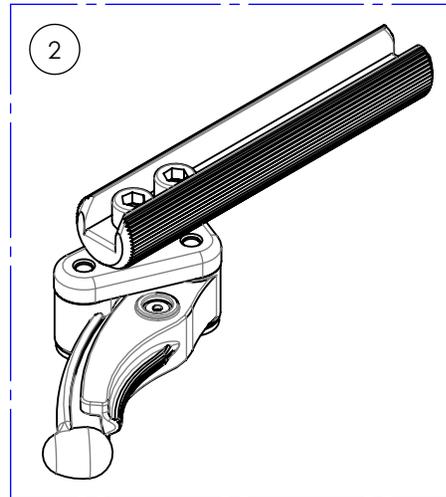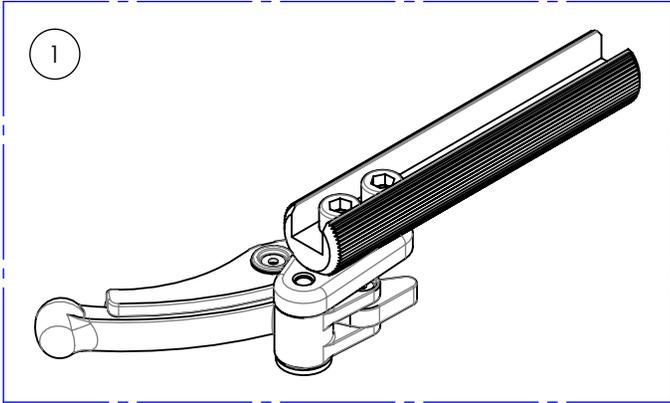

**APPLICABLE SUR LES FAUTEUILS À  
PARTIR DU NUMÉRO DE SÉRIE #72827**


**Catalogue de blocages de roue**  
**Ensemble d'adaptation de blocage de roue unilatéral**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                     | QTÉ |
|----------|-------------|---|-----|
| 1        | 9001002A-00 | KIT - ADAPTATION BLOCAGE DE ROUE UNILATÉRAL 4po | 1   |

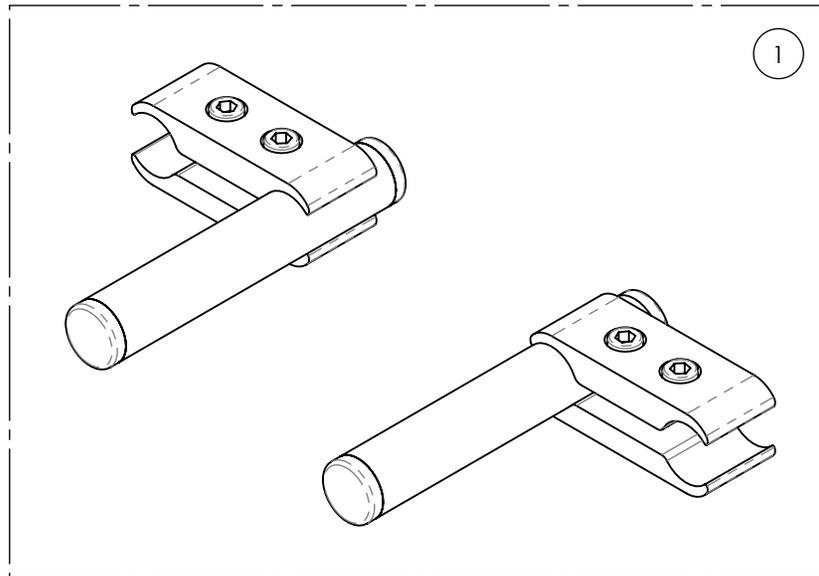


**0007400A**  
**APPUI-BRAS - TYPE T, DROITE, 6-10 po**


| 0007400A - |             |   |        |        |
|------------|-------------|---|--------|--------|
| NO. ITEM   | NO. PIÈCE   | DESCRIPTION                                       | 00/QTÉ | 01/QTÉ |
| 1          | 0003521B-00 | APPUIE-BRAS T PETIT 6-10po, DROITE                | 1      | 1      |
| 2          | 9010394A-00 | STRUCTURE - GARNITURE STD, 8-12po, COURTE, DROITE | 1      | -      |
| 3          | 9010396A-00 | STRUCTURE - GARNITURE STD, 8-12po, LONGUE, DROITE | -      | 1      |

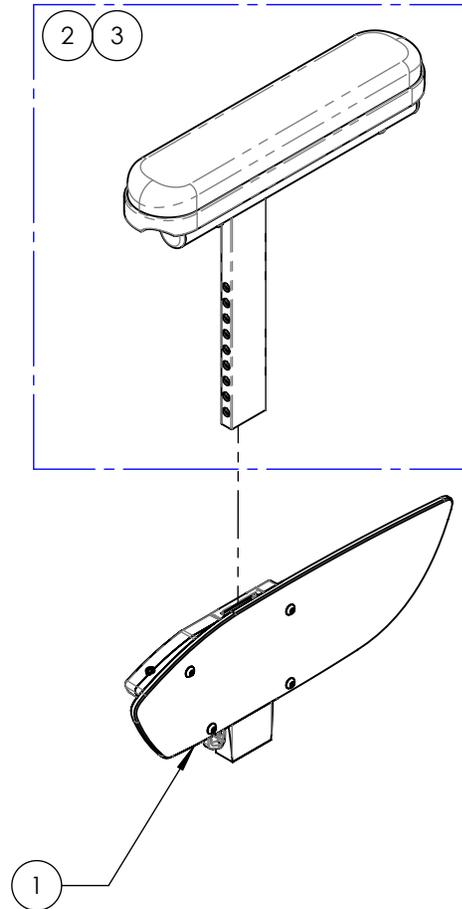

0007400A-00  
 APPUI-BRAS - TYPE T, DROITE, 6-10 po, COURT


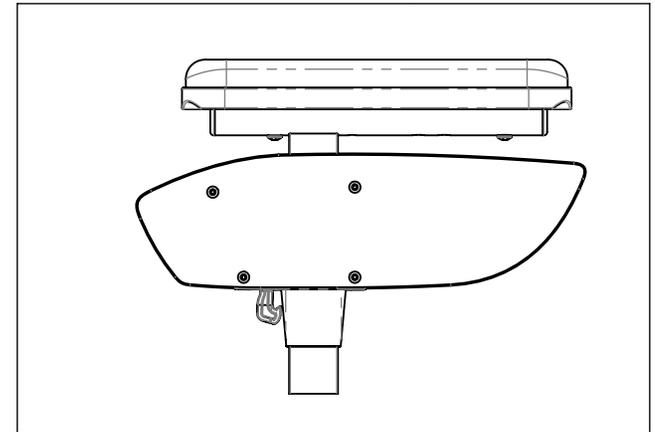


0007400A-01  
 APPUI-BRAS - TYPE T, DROITE, 6-10 po, LONG

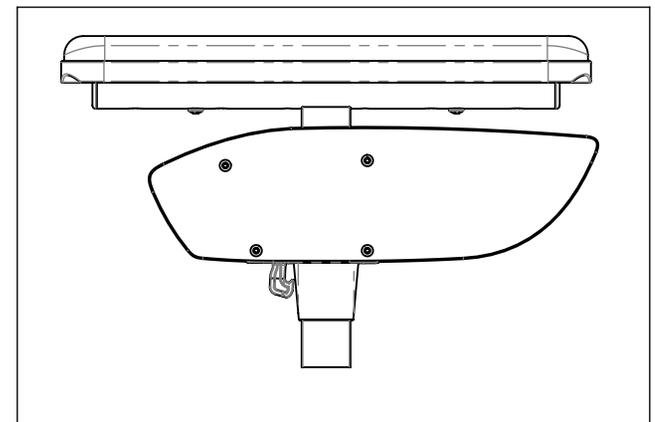


**0007402A**  
**APPUI-BRAS - TYPE T, GAUCHE, 6-10Po**


| 0007402A - |             |   |        |        |
|------------|-------------|---|--------|--------|
| NO. ITEM   | NO. PIÈCE   | DESCRIPTION                                       | 00/QTÉ | 01/QTÉ |
| 1          | 0003521B-01 | APPUIE-BRAS T PETIT 6-10po, GAUCHE                | 1      | 1      |
| 2          | 9010398A-00 | STRUCTURE - GARNITURE STD, 8-12po, COURTE, GAUCHE | 1      | -      |
| 3          | 9010400A-00 | STRUCTURE - GARNITURE STD, 8-12po, LONGUE, GAUCHE | -      | 1      |

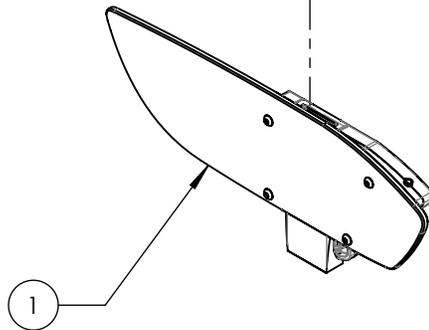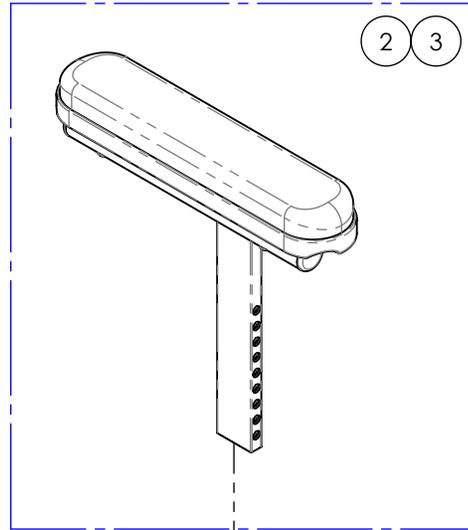

0007402A-00  
 APPUI-BRAS - TYPE T, GAUCHE, 6-10 po, COURT

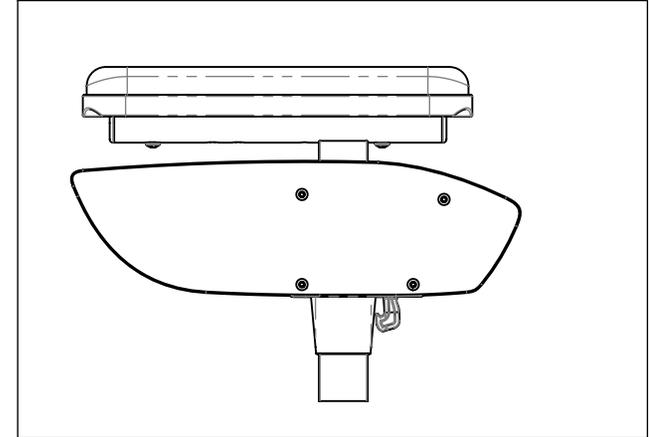


0007402A-01  
 APPUI-BRAS - TYPE T, GAUCHE, 6-10 po, LONG

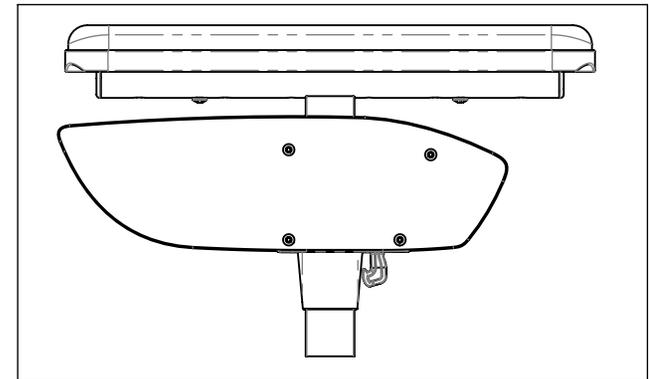



ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

| REVISIONS |                                       |            |          |
|-----------|---------------------------------------|------------|----------|
| REV.      | DESCRIPTION                           | DATE       | APPROVED |
| a.1       | RELEASE FOR PRODUCTION                | 2015-03-16 | VB       |
| a.3       | REVERSED PART 33707                   | 2018-09-19 | PLS      |
| a.4       | CORRECT REVISION ERROR OF PART 033135 | 2018-10-18 | PLS      |

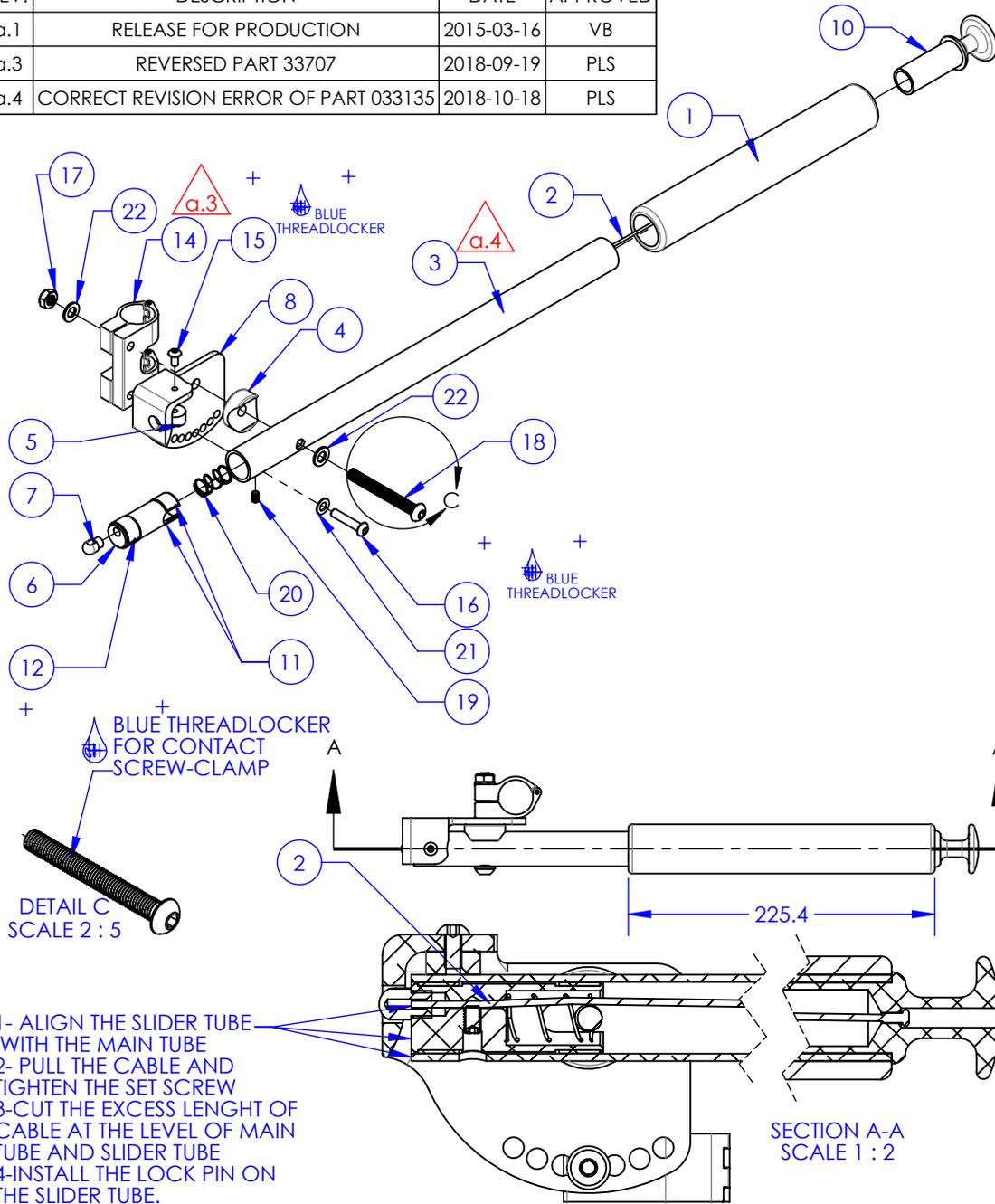

- 1- ALIGN THE SLIDER TUBE WITH THE MAIN TUBE
- 2- PULL THE CABLE AND TIGHTEN THE SET SCREW
- 3-CUT THE EXCESS LENGTH OF CABLE AT THE LEVEL OF MAIN TUBE AND SLIDER TUBE
- 4-INSTALL THE LOCK PIN ON THE SLIDER TUBE.

| ITEM NO. | PART NO.    | REV. | DESCRIPTION                                      | 033504 /QTY. | 033503 /QTY. |
|----------|-------------|------|--|--------------|--------------|
| 1        | 0033049A-00 | 0    | SWING AWAY TUBULAR FOAM GRIP                     | 1            | 1            |
| 2        | 0033134A-00 | 0    | FLIP UP I ARMREST - CABLE                        | 1            | 1            |
| 3        | 0033135A-00 | 2    | a.4 FLIP UP I ARMREST - MAIN TUBE                | 1            | 1            |
| 4        | 0033136A-00 | 1    | FLIP UP I ARMREST - 25mm COVED WASHER            | 1            | 1            |
| 5        | 0033141A-00 | 1    | FLIP UP I ARMREST - STOPPER                      | 1            | 1            |
| 6        | 0033142A-00 | 1    | FLIP UP I ARMREST - SLIDER TUBE                  | 1            | 1            |
| 7        | 0033143A-00 | 1    | FLIP UP I ARMREST - LOCK PIN                     | 1            | 1            |
| 8        | 0033144A-00 | 1    | FLIP UP I ARMREST - RIGHT PIVOT PLATE            | -            | 1            |
| 9        | 0033145A-00 | 1    | FLIP UP I ARMREST - LEFT PIVOT PLATE             | 1            | -            |
| 10       | 0033146A-00 | 1    | FLIP UP I ARMREST - PULL KNOB                    | 1            | 1            |
| 11       | 0033148A-00 | 1    | FLIP UP I ARMREST - 20mm UHMW SELF ADHESIVE TAPE | 2            | 2            |
| 12       | 0033149A-00 | 1    | FLIP UP I ARMREST - 58mm UHMW SELF ADHESIVE TAPE | 1            | 1            |
| 13       | 0033706A-00 | 0    | FLIP UP I ARMREST CLAMP - ASSEMBLY (M) RIGHT     | 1            | -            |
| 14       | 0033707A-00 | 0    | FLIP UP I ARMREST CLAMP - ASSEMBLY (M) LEFT      | -            | 1            |
| 15       | 0090643A-00 | 1    | BUTTON CAP SCREW M5x0.8x10mm L                   | 1            | 1            |
| 16       | 0090664A-00 | 1    | BUTTON CAP SCREW M6x1x30mm L                     | 1            | 1            |
| 17       | 0090990A-00 | 0    | THin LOCKNUT M8x1.25                             | 1            | 1            |
| 18       | 0091022A-00 | 0    | BUTTON CAP SCREW M8x1.25x70mm L                  | 1            | 1            |
| 19       | 0091025A-00 | 0    | SET SCREW M5x0.8x8mm L                           | 1            | 1            |
| 20       | 0091028A-00 | 0    | COMP SPRING, 25 L, 14 OD, 4.5NA, 1.0mm WIRE      | 1            | 1            |
| 21       | 0099560A-00 | 0    | FLAT WASHER 1/4in, 17/64 ID, 1/2 OD, .032 THK    | 1            | 1            |
| 22       | 0099590A-00 | 0    | FLAT WASHER 5/16in, 21/64 ID, 19/32 OD, .062 THK | 2            | 2            |

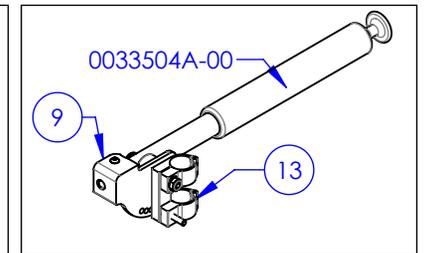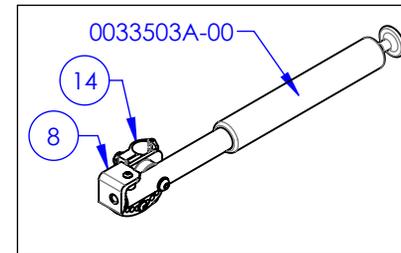

SAMPLE MUST BE APPROVED BY MOTION COMPOSITES PRIOR TO START PRODUCTION.



DESCRIPTION:  
FLIP UP I ARMREST - ASSY

PART No:  
0033503A\_0033504A

DRAWN BY: PLS  
DATE: 2018-10-18

REV: 4  
DRAWING STATE:  
Level 3

VERIFIED BY: MAB  
DATE: 2015-08-14

APPROVED BY: PLS  
DATE: 2018-10-18

PROJECTION:

TOLERANCES:  
X : ± 0.40  
X.X : ± 0.25  
X.XX : ± 0.125

PART MUST BE CLEAN.  
 SUPPLIER MUST CLEAN SHARP EDGES.  
 HARDWARE COLOR:  
 STANDARD TORQUE FOR HEX SOCKET DRIVE:  
 - 5 mm : 12 Nm  
 - 4 mm : 7 Nm  
 - 3 mm : 4 Nm

**PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL**  
 THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF MOTION COMPOSITES INC. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF MOTION COMPOSITES INC. IS PROHIBITED. PENDING PATENT



All DIMENSIONS ARE IN mm

SCALE:1:5


SHEET 1 OF 1

**9001299B\_9001300B**  
**APPUI-BRAS - TYPE T & U, DROIT, 8-12 po**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                       | 9001299 | 9001300 |
|----------|-------------|---|---------|---------|
| 1        | 9010394B-00 | STRUCTURE - GARNITURE STD, 8-12po, COURTE, DROITE | 1       | -       |
| 2        | 9010396B-00 | STRUCTURE - GARNITURE STD, 8-12po, LONGUE, DROITE | -       | 1       |
| 3        | 0033554B-00 | APPUI BRAS V2 - ASSEMBLAGE                        | 1       | 1       |

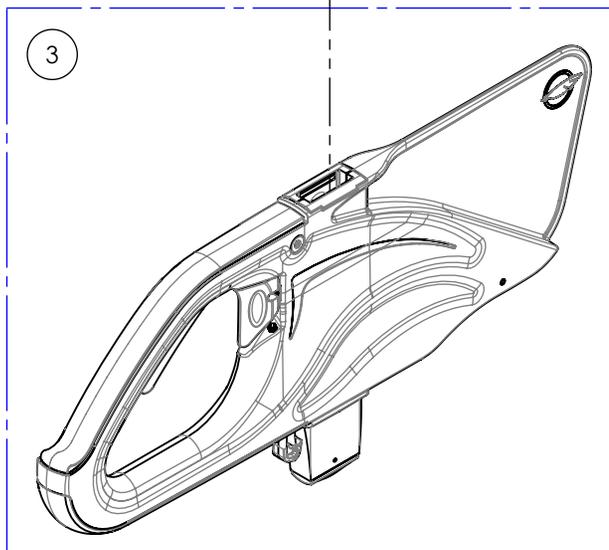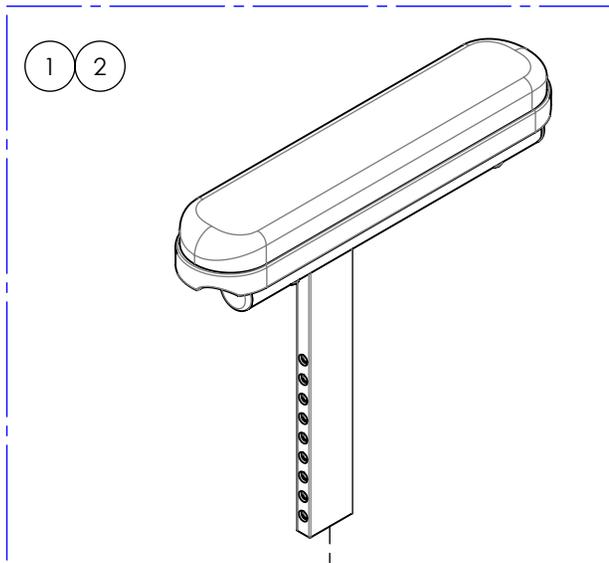

9001299B-00  
 APPUI-BRAS - TYPE T & U, DROITE, 8-12po, COURT

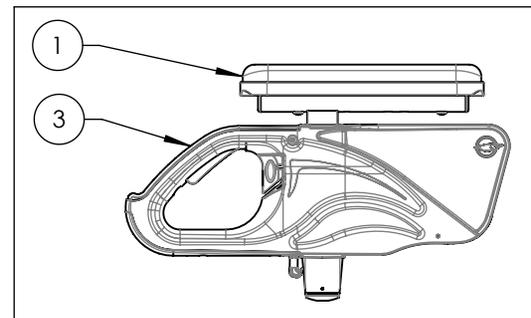



9001300B-00  
 APPUI-BRAS - TYPE T & U, DROITE, 8-12po, LONG

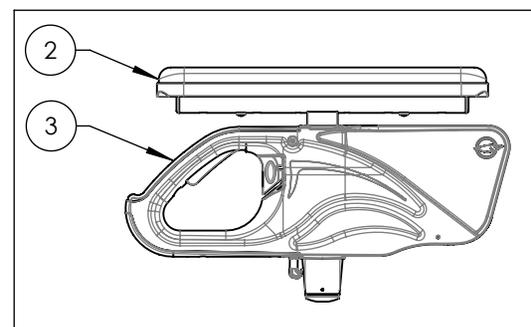


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001301B 9001302B**  
**APPUI-BRAS - TYPE T & U, DROIT, 10-14 po**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION  | 9001301 | 9001302 |
|----------|-------------|--|---------|---------|
| 1        | 9010395A-00 | STRUCTURE - GARNITURE STD, 10-14po, COURTE, DROITE | 1       | -       |
| 2        | 9010397A-00 | STRUCTURE - GARNITURE STD, 10-14po, LONGUE, DROITE | -       | 1       |
| 3        | 0033554B-00 | APPUI BRAS V2 - ASSEMBLAGE                         | 1       | 1       |

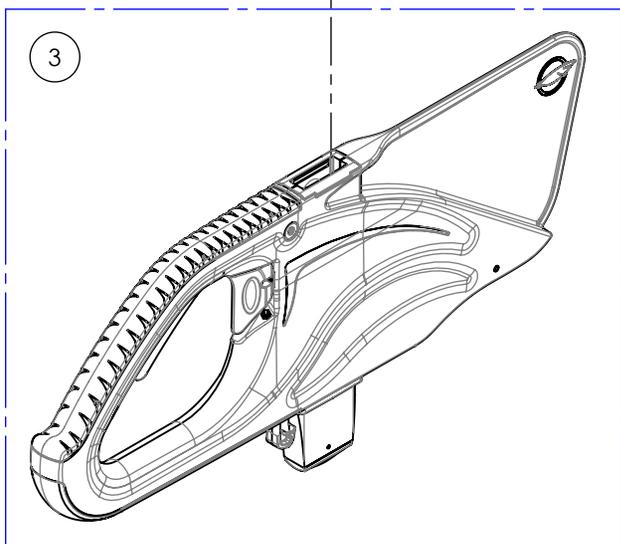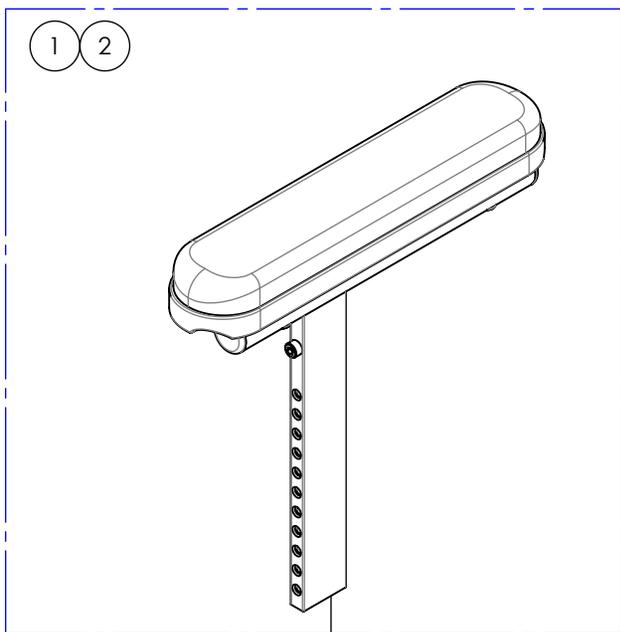

9001301B-00  
 APPUI-BRAS - TYPE T & U, DROITE, 10-14po, COURT

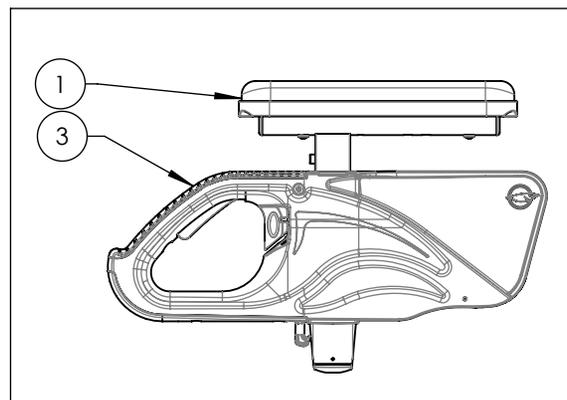



9001302B-00  
 APPUI-BRAS - TYPE T & U, DROITE, 10-14po, LONG

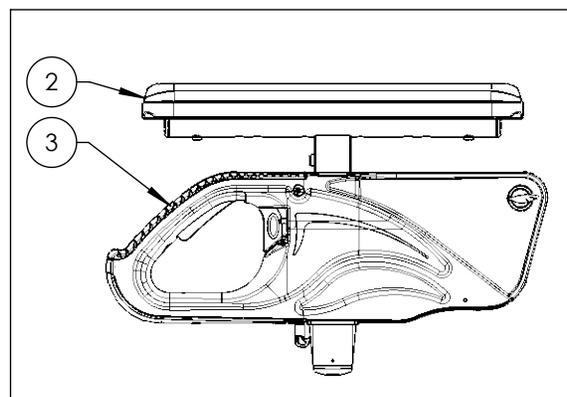


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001303B\_9001304B**  
**APPUI-BRAS - TYPE T & U, GAUCHE, 8-12 po**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                       | 9001303 | 9001304 |
|----------|-------------|---|---------|---------|
| 1        | 9010398B-00 | STRUCTURE - GARNITURE STD, 8-12po, COURTE, GAUCHE | 1       | -       |
| 2        | 9010400B-00 | STRUCTURE - GARNITURE STD, 8-12po, LONGUE, GAUCHE | -       | 1       |
| 3        | 0033554B-00 | APPUI BRAS V2 - ASSEMBLAGE                        | 1       | 1       |

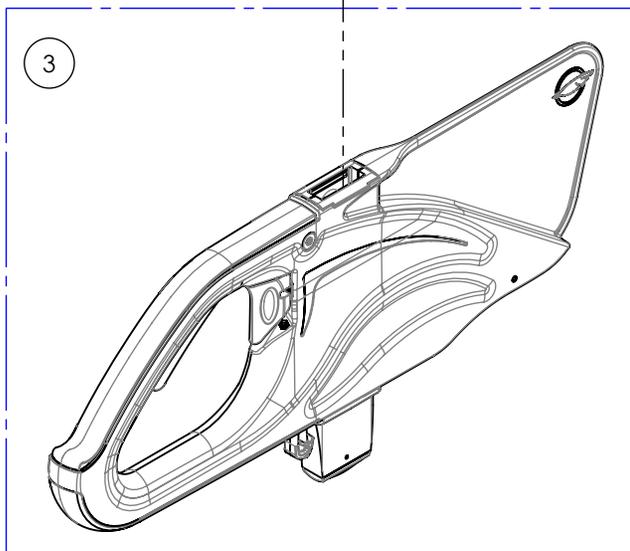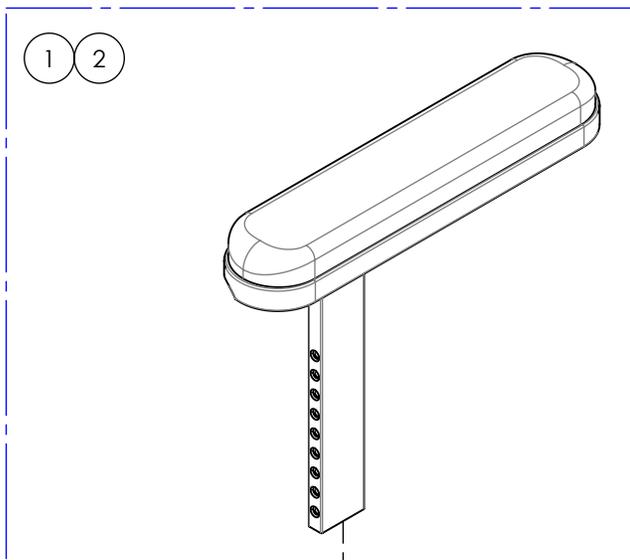

9001303B-00  
 APPUI-BRAS - TYPE T & U, GAUCHE, 8-12po, COURT


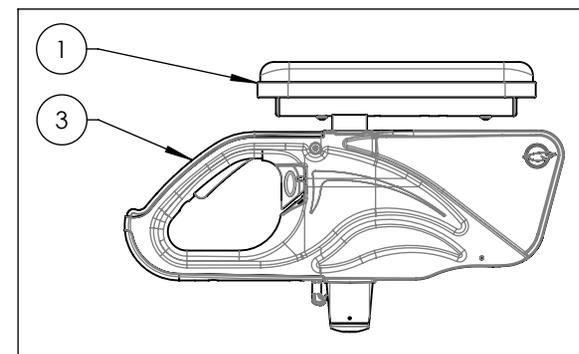


9001304B-00  
 APPUI-BRAS - TYPE T & U, GAUCHE, 8-12po, LONG

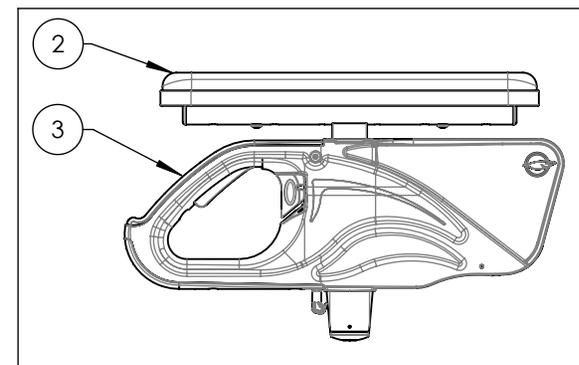


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001305B 9001306B**  
**APPUI-BRAS - TYPE T & U, GAUCHE, 10-14 po**

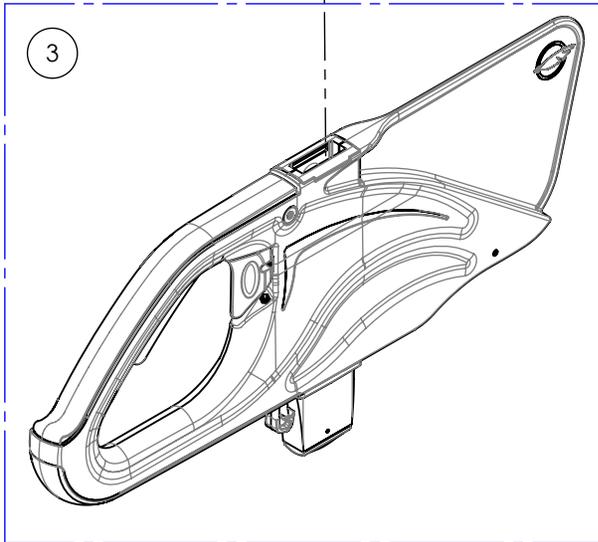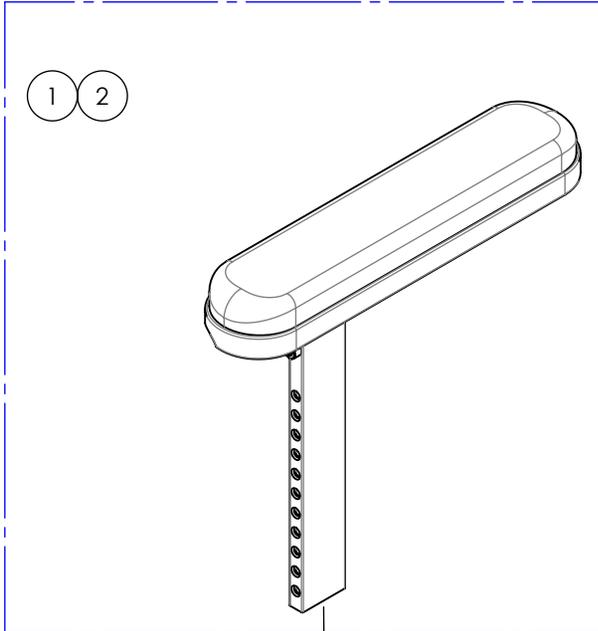


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION  | 9001305 | 9001306 |
|----------|-------------|--|---------|---------|
| 1        | 9010399B-00 | STRUCTURE - GARNITURE STD, 10-14po, COURTE, GAUCHE | 1       | -       |
| 2        | 9010401B-00 | STRUCTURE - GARNITURE STD, 10-14po, LONGUE, GAUCHE | -       | 1       |
| 3        | 0033554B-00 | APPUI BRAS V2 - ASSEMBLAGE                         | 1       | 1       |

9001305B-00  
 APPUI-BRAS - TYPE T & U, GAUCHE, 10-14po, COURT

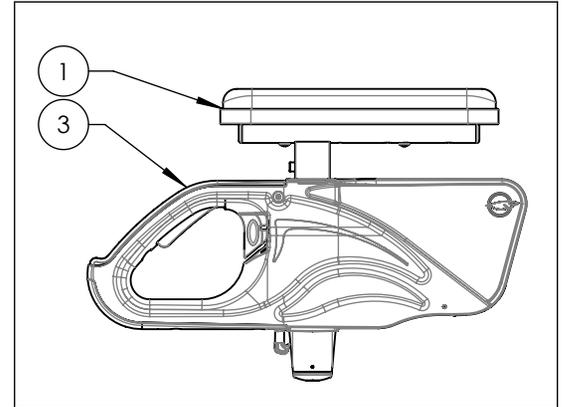



9001306B-00  
 APPUI-BRAS - TYPE T & U, GAUCHE, 10-14po, LONG

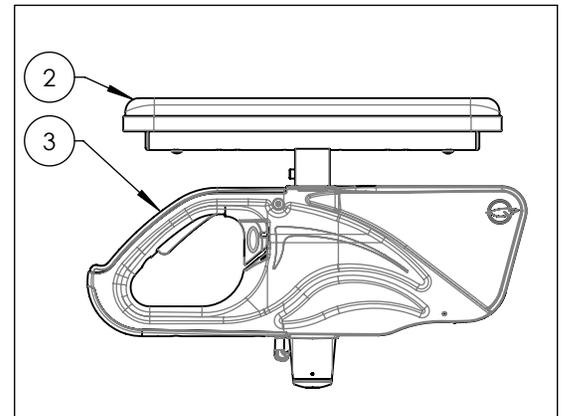

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001308A-00**  
**APPUI-BRAS - TYPE L, DROITE, TUBULAIRE**



| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                               | QTÉ |
|----------|-------------|---|-----|
| 1        | 0033552A-00 | ÉCROU FENDU APPUI BRAS L - ASSEMBLAGE (M) | 1   |
| 2        | 0033035B-00 | APPUI BRAS L DROIT                        | 1   |
| 3        | 0033049A-00 | GANITURE TUBULAIRE APPUI BRAS L           | 1   |
| 4        | 0099702A-00 | BOUCHON 1po (ALU)                         | 1   |

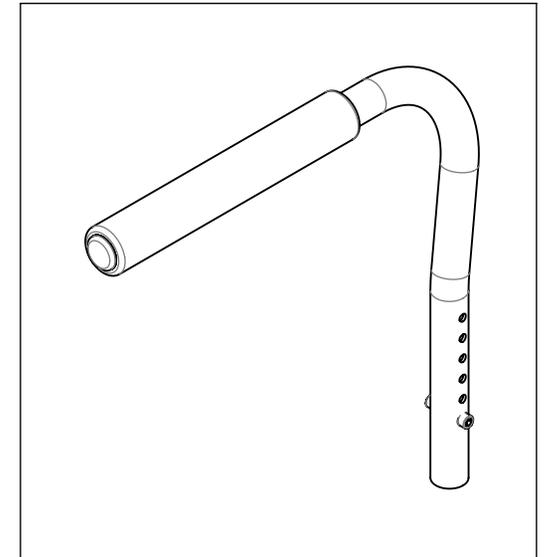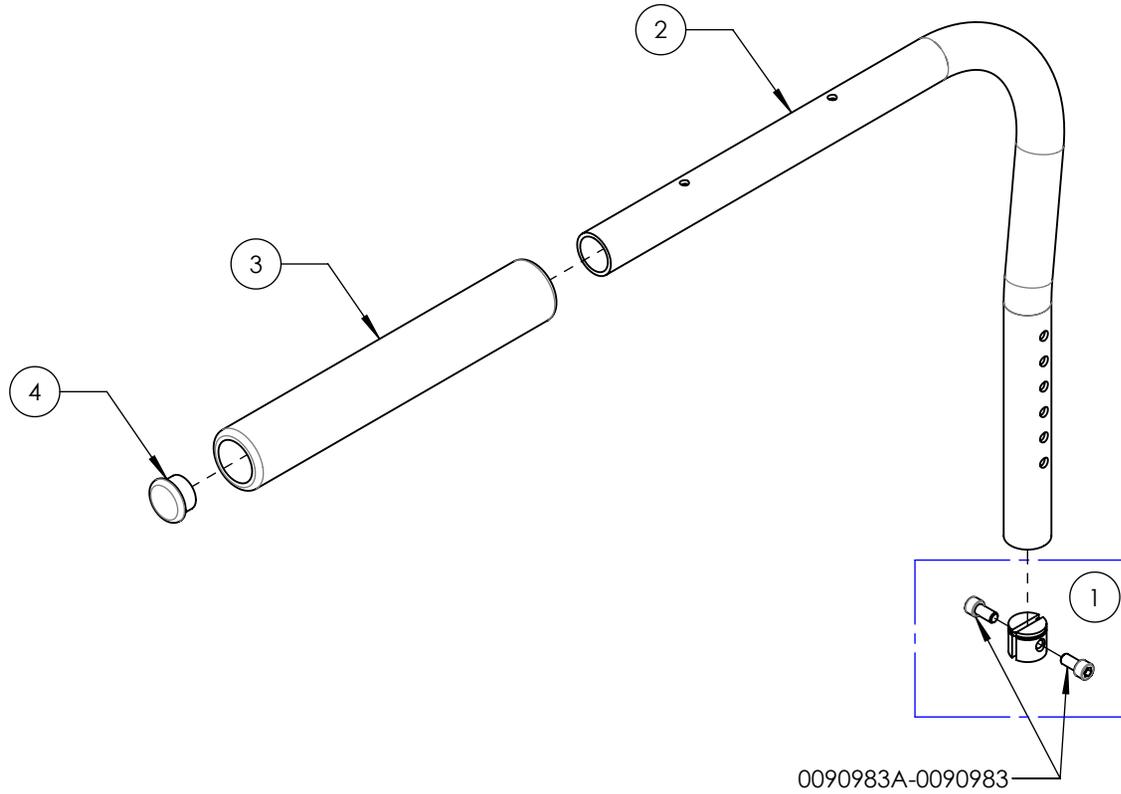

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001309A-00**  
**APPUI-BRAS - TYPE L, GAUCHE, TUBULAIRE**



| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                               | QTÉ. |
|----------|-------------|---|------|
| 1        | 0033552A-00 | ÉCROU FENDU APPUI BRAS L - ASSEMBLAGE (M) | 1    |
| 2        | 0033049A-00 | GANITURE TUBULAIRE APPUI BRAS L           | 1    |
| 3        | 0099702A-00 | BOUCHON 1po (ALU)                         | 1    |
| 4        | 0033036B-00 | APPUI BRAS L GAUCHE                       | 1    |

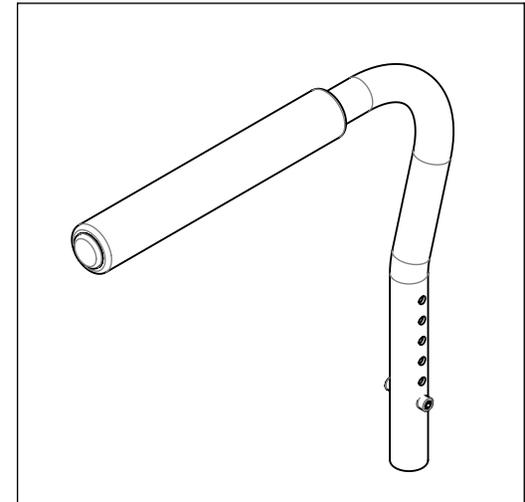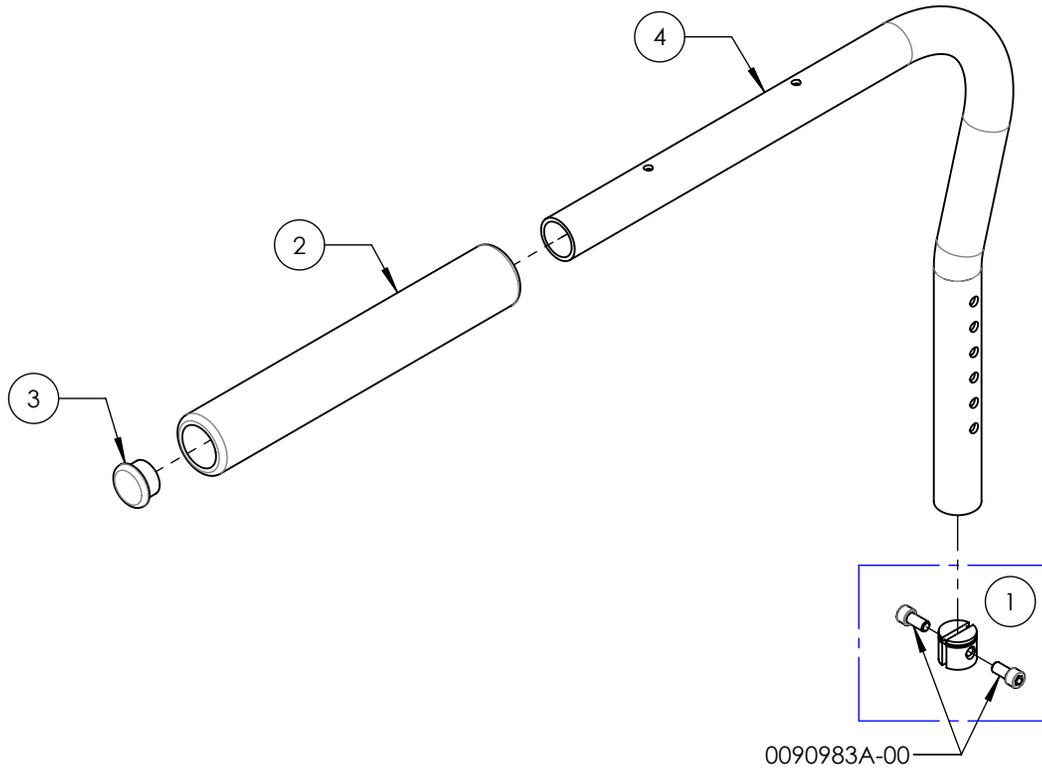

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001310A-00**  
**APPUI-BRAS - TYPE L, DROITE, GARNITURE COURTE**



| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 1        | 0033552A-00 | ÉCROU FENDU APPUI BRAS L - ASSEMBLAGE (M)  | 1   |
| 2        | 0033035B-00 | APPUI BRAS L DROIT                         | 1   |
| 3        | 0033038B-00 | GARNITURE APPUI BRAS COURT                 | 1   |
| 4        | 0099013A-00 | VIS TÊTE CYL LARGE PHILLIPS #10-32x1.5po L | 2   |
| 5        | 0099702A-00 | BOUCHON 1po (ALU)                          | 1   |

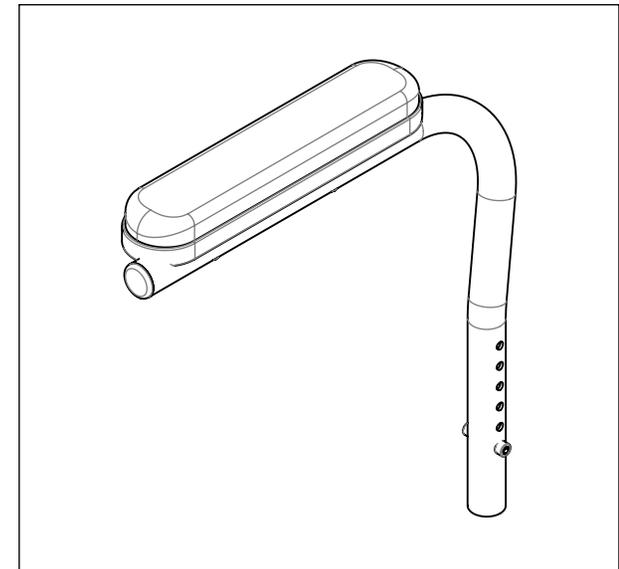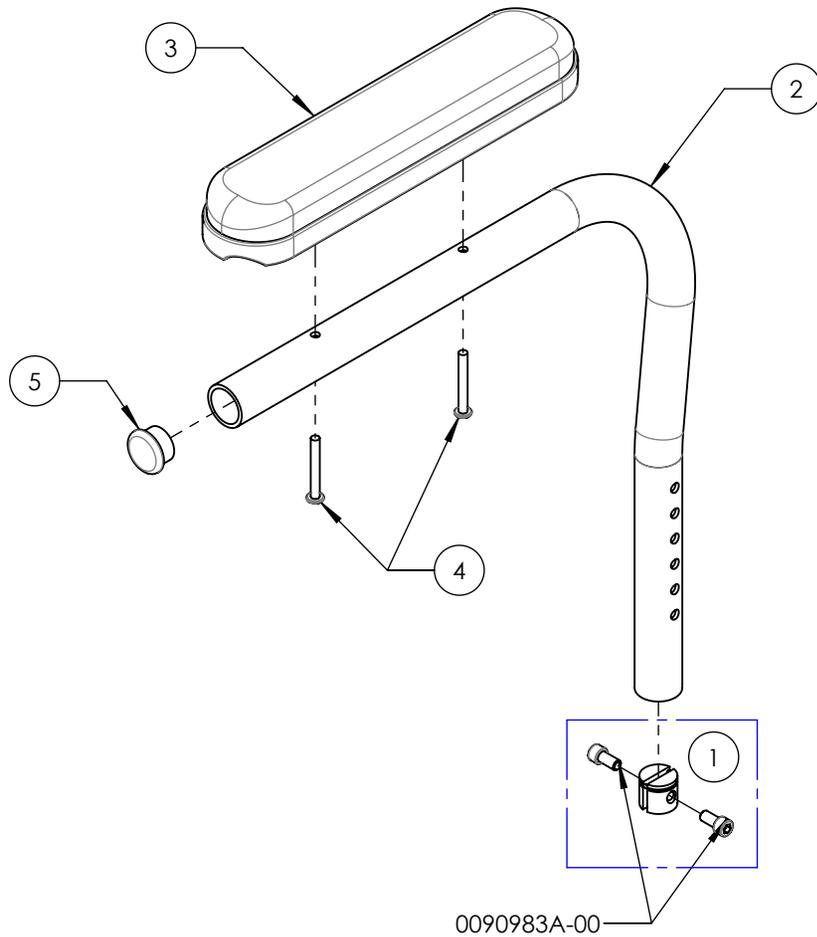

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001311A-00**  
**APPUI-BRAS - TYPE L, GAUCHE, GARNITURE COURTE**




| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                | QTÉ. |
|----------|-------------|--|------|
| 1        | 0033552A-00 | ÉCROU FENDU APPUI BRAS L - ASSEMBLAGE (M)  | 1    |
| 2        | 0033038B-00 | GARNITURE APPUI BRAS COURT                 | 1    |
| 3        | 0033036B-00 | APPUI BRAS L GAUCHE                        | 1    |
| 4        | 0099013A-00 | VIS TÊTE CYL LARGE PHILLIPS #10-32x1.5po L | 2    |
| 5        | 0099702A-00 | BOUCHON 1po (ALU)                          | 1    |

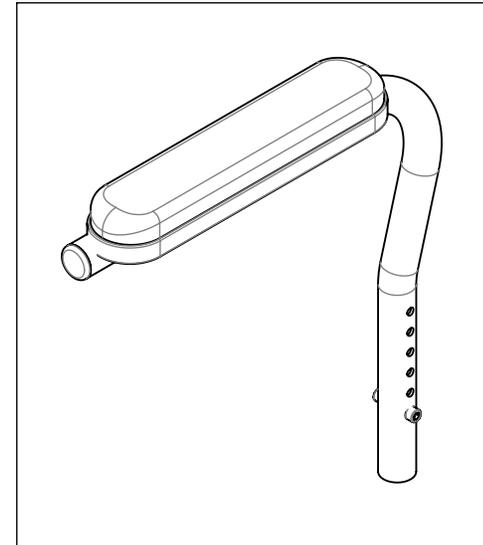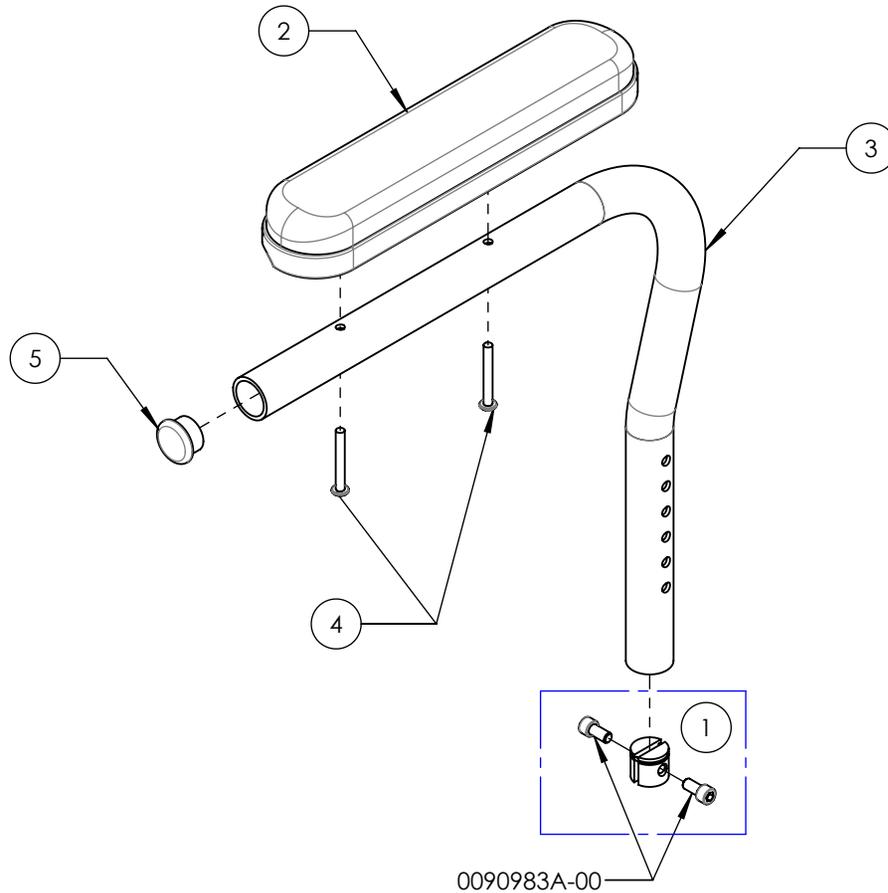

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001313A-00**  
**Pivot arrière - Type T & U, droite**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                       | QTÉ | REPLACEMENT PIÈCES |
|----------|-------------|---|-----|--------------------|
| 1        | 0033558A-00 | PIVOT ARRIÈRE APPUI BRAS V2 - ASSEMBLAGE          | 1   | -                  |
| 2        | 0033561A-00 | MANETTE DOUBLE CROCHET APPUI BRAS V2 - ASSEMBLAGE | -   | 1                  |

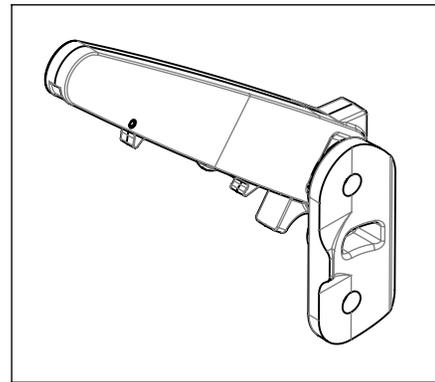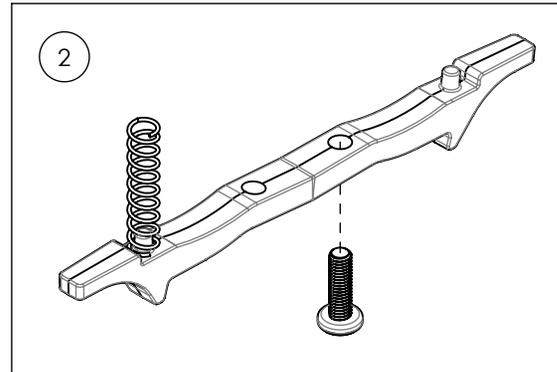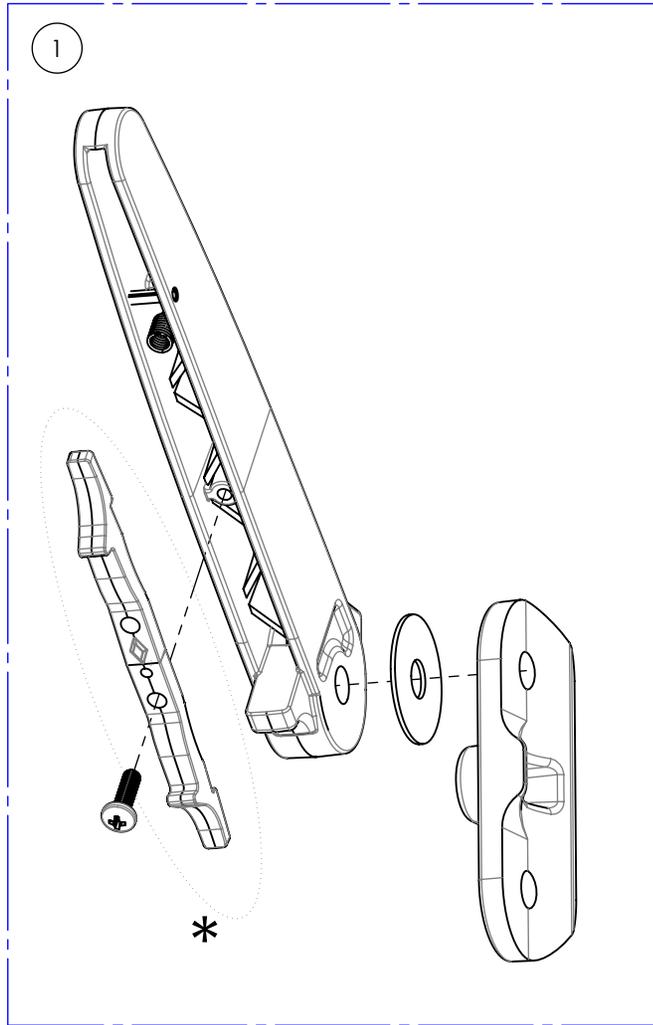




**\* OPTION D'INSTALLATION DE LA MANETTE DOUBLE**

| AMOVIBLE | FIXE     |
|----------|----------|
|          |          |
|          |          |
| DÉTAIL A | DÉTAIL B |





NOTER LA DIRECTION DU LOSANGE SUR LA MANETTE DOUBLE, SA DISTANCE PAR RAPPORT À LA VIS INDIQUE LA CONFIGURATION QUI EST UTILISÉE

**9001314A-00**  
**Pivot arrière - Type T & U, gauche**

| NO. ITEM | NO. PIÈCE   | DESCRIPTION                                       | QTÉ | REPLACEMENT PIÈCES |
|----------|-------------|---|-----|--------------------|
| 1        | 0033558A-00 | PIVOT ARRIÈRE APPUI BRAS V2 - ASSEMBLAGE          | 1   | -                  |
| 2        | 0033561A-00 | MANETTE DOUBLE CROCHET APPUI BRAS V2 - ASSEMBLAGE | -   | 1                  |

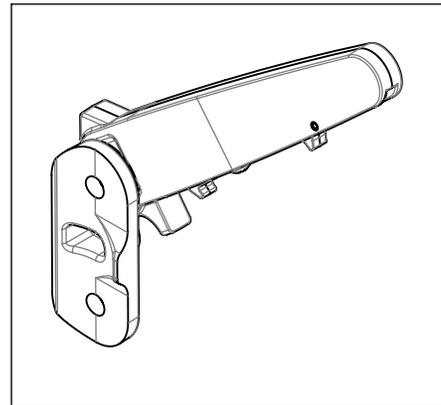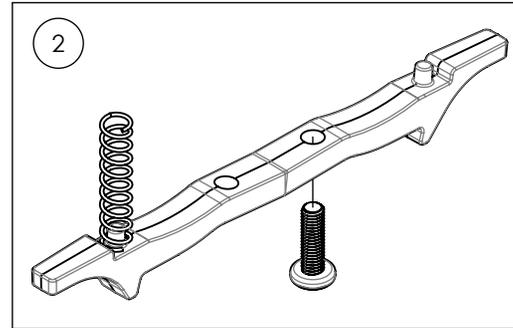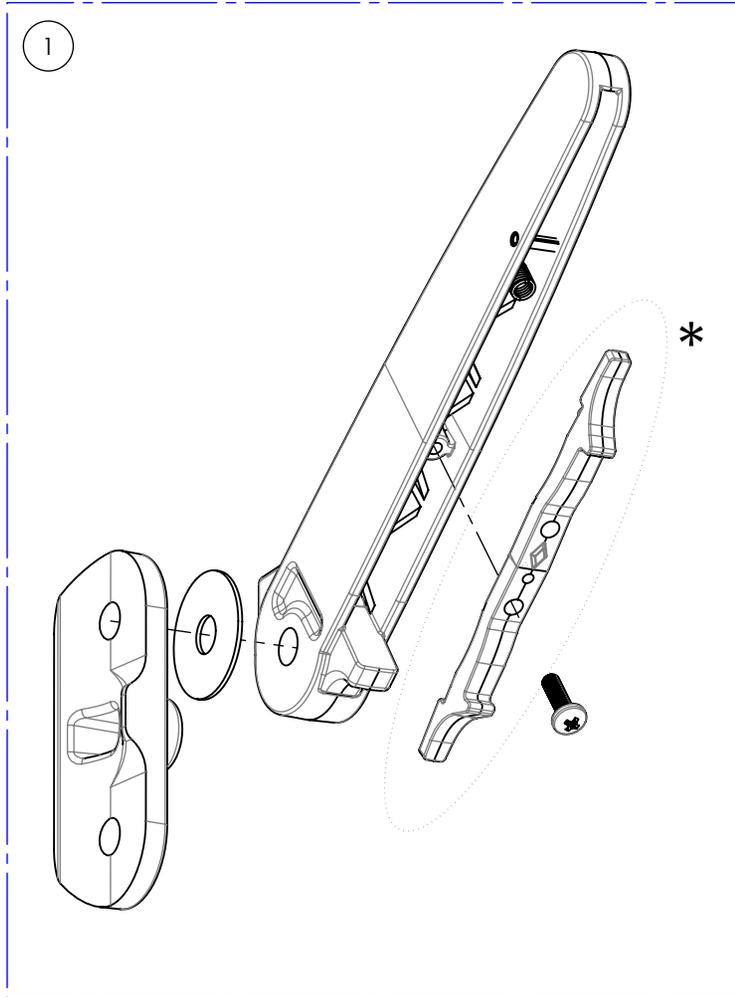



**\* OPTION D'INSTALLATION DE LA MANETTE DOUBLE**
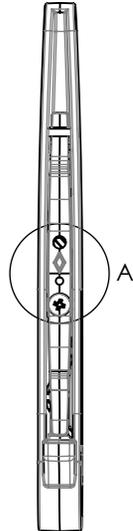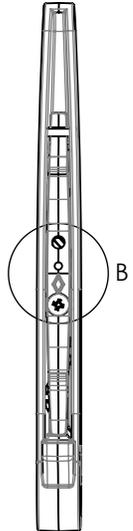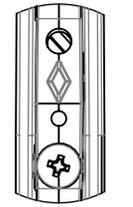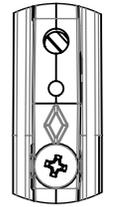
| AMOVIBLE   | FIXE   |
|--|--|
|   |   |
|  |  |
| DETAIL A   | DETAIL B   |

NOTER LA DIRECTION DU LOSANGE SUR LA MANETTE DOUBLE, SA DISTANCE PAR RAPPORT À LA VIS INDIQUE LA CONFIGURATION QUI EST UTILISÉE


**9001315A-00**  
**Réceptacle - Type L**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                    | QTÉ |
|----------|-------------|--------------------------------|-----|
| 1        | 0033538C-00 | BATI APPUI BRAS L - ASSEMBLAGE | 1   |

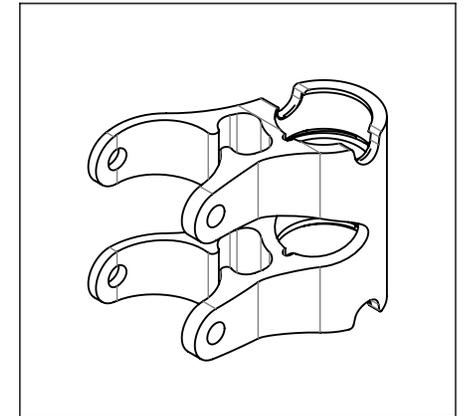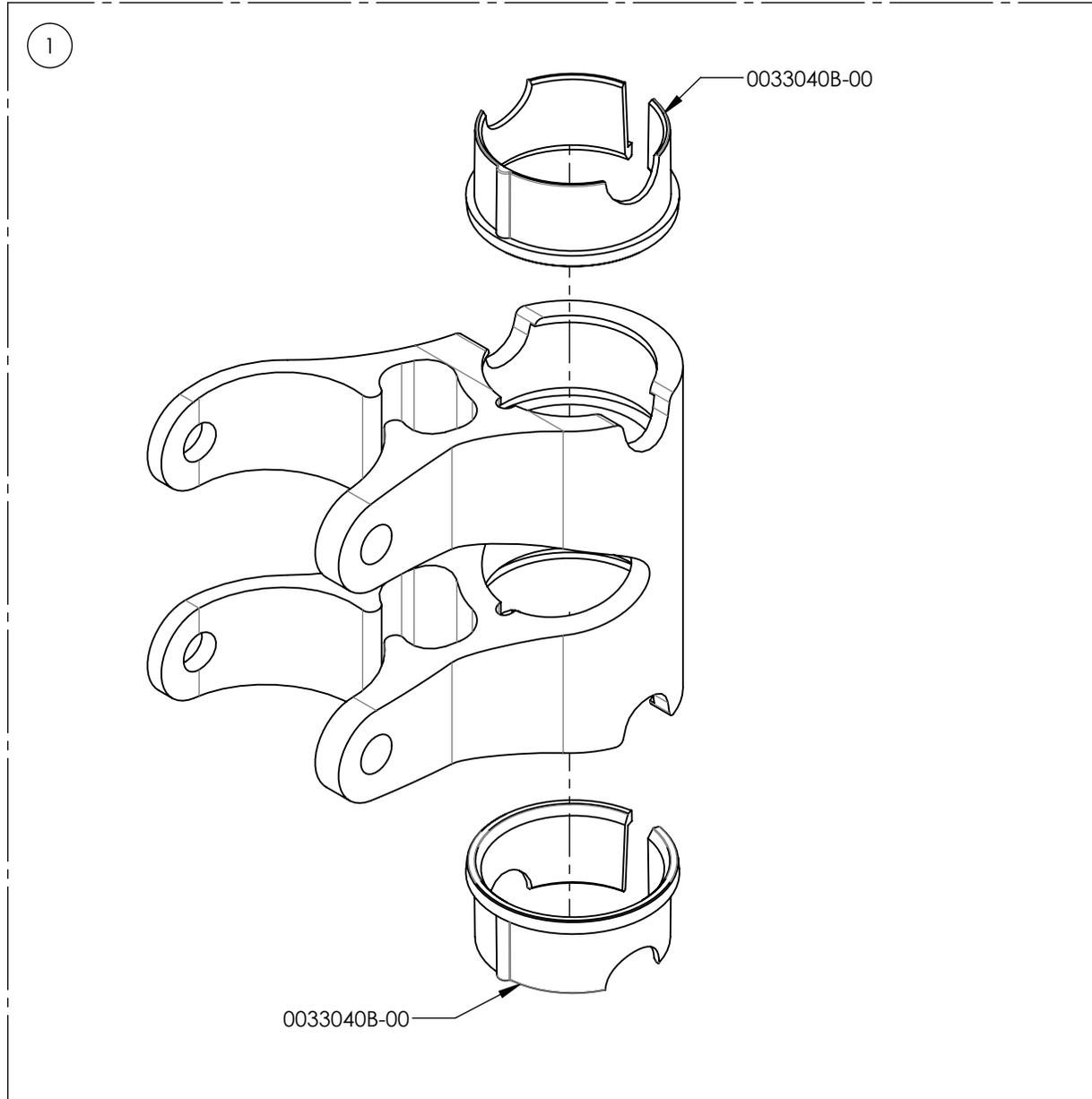


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9002933B 9002934B**  
**APPUI-BRAS - STRUCTURE APPUI-BRAS V2, GARNITURE LONGUE EN GEL, DROIT**

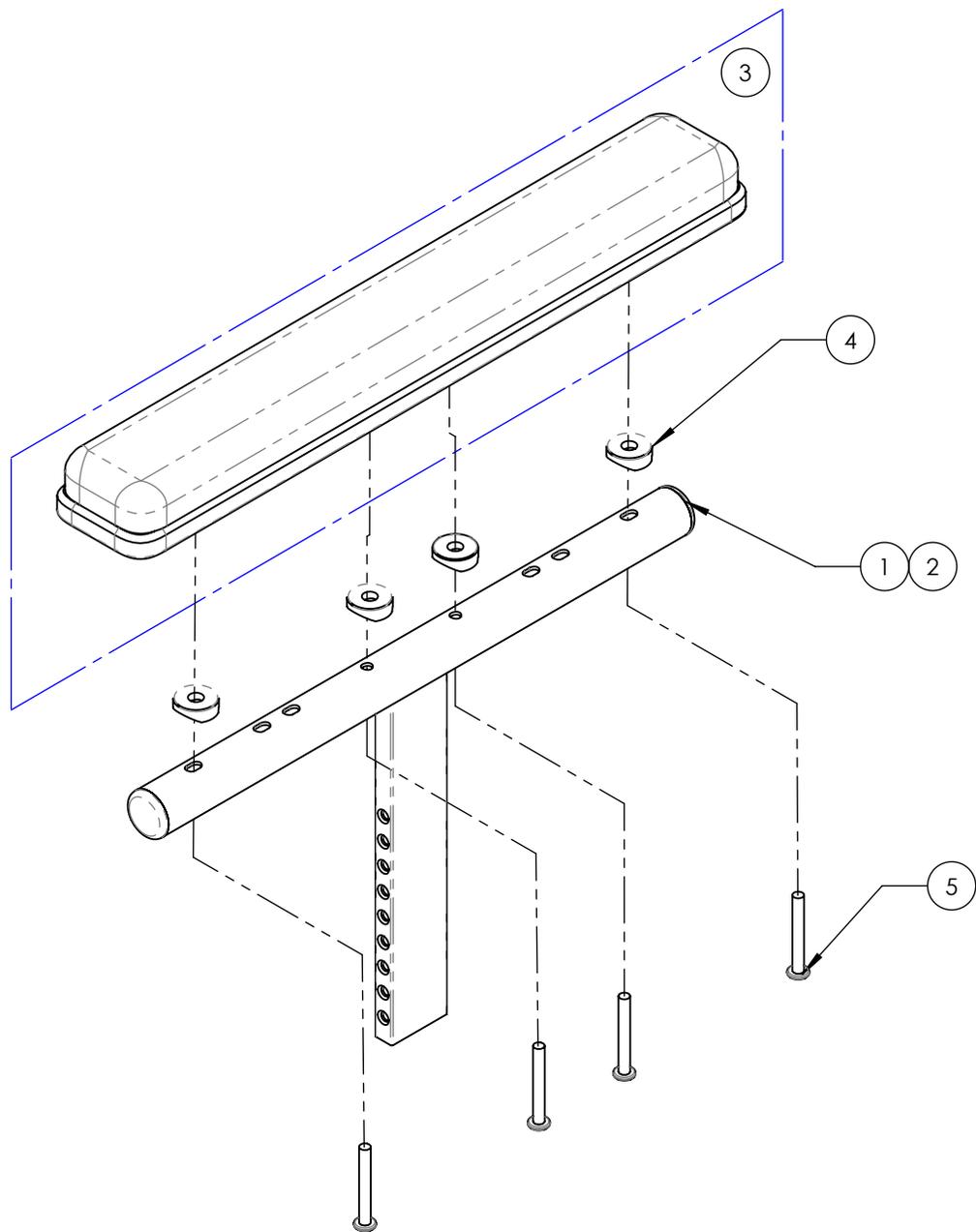


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                      | 9002933 | 9002934 |
|----------|-------------|--|---------|---------|
| 1        | 0033559B-00 | STRUCT APPUI BRAS V2 LONG 8-12po - ASSY          | 1       | -       |
| 2        | 0033560B-00 | STRUCT APPUI BRAS V2 LONG 10-14po - ASSY         | -       | 1       |
| 3        | 0033077A-00 | GARNITURE APPUI BRAS EN GEL OVATION 2x14po, LONG | 1       | 1       |
| 4        | 0033068A-00 | RONDELLE DOMÉE 1/4POX1-1/4po PLASTIQUE           | 4       | 4       |
| 5        | 0099013A-00 | VIS TÊTE CYL LARGE PHILLIPS #10-32x1.5po L       | 4       | 4       |

9002933B-00  
 STRUCTURE - GARNITURE GEL, 8-12po,  
 LONGUE, DROITE

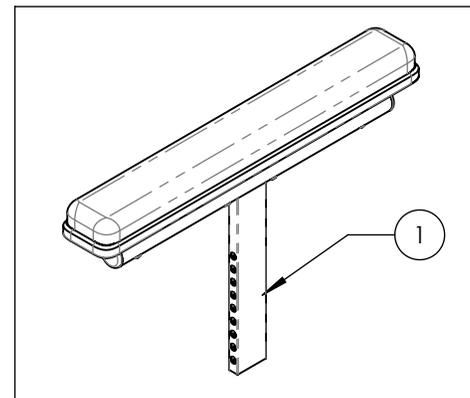


9002934B-00  
 STRUCTURE - GARNITURE GEL, 10-14po,  
 LONGUE, DROITE

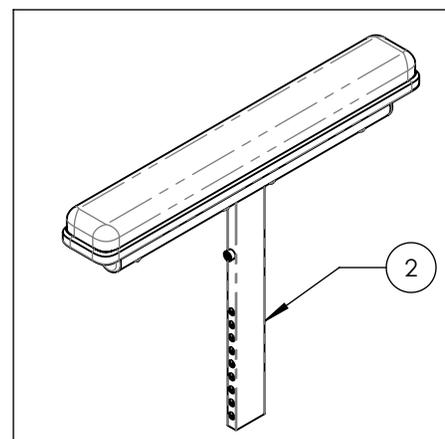


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9002935B\_9002936B**  
**APPUI-BRAS - STRUCTURE APPUI-BRAS V2, GARNITURE LONGUE EN GEL, GAUCHE**

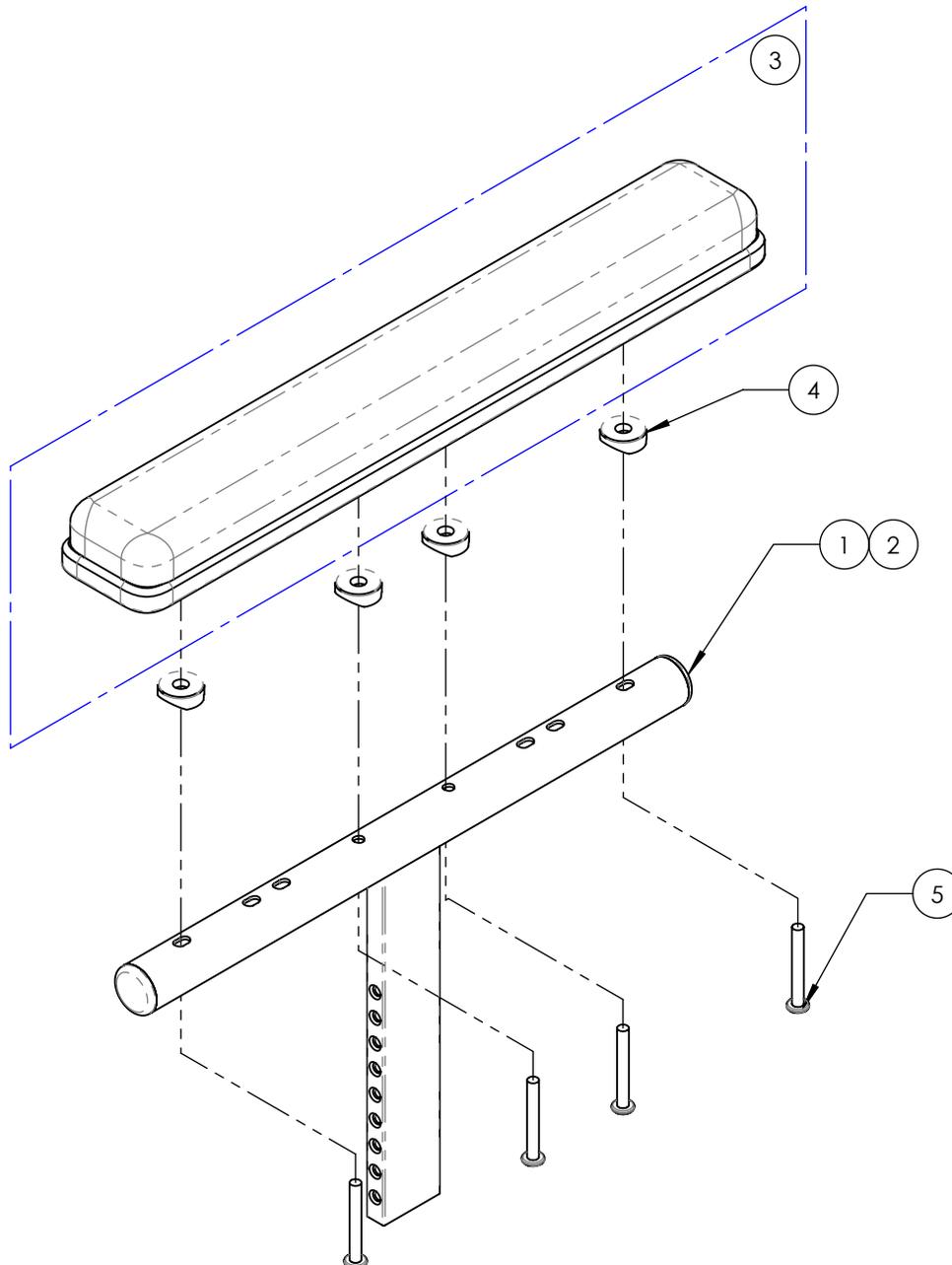


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                      | 9002935 | 9002936 |
|----------|-------------|--|---------|---------|
| 1        | 0033559B-00 | STRUCT APPUI BRAS V2 LONG 8-12po - ASSY          | 1       | -       |
| 2        | 0033560B-00 | STRUCT APPUI BRAS V2 LONG 10-14po - ASSY         | -       | 1       |
| 3        | 0033077A-00 | GARNITURE APPUI BRAS EN GEL OVATION 2x14po, LONG | 1       | 1       |
| 4        | 0033068A-00 | RONDELLE DOMÉE 1/4POX1-1/4po PLASTIQUE           | 4       | 4       |
| 5        | 0099013A-00 | VIS TÊTE CYL LARGE PHILLIPS #10-32x1.5po L       | 4       | 4       |

9002935B-00  
 STRUCTURE - GARNITURE GEL, 8-12po,  
 LONGUE, GAUCHE

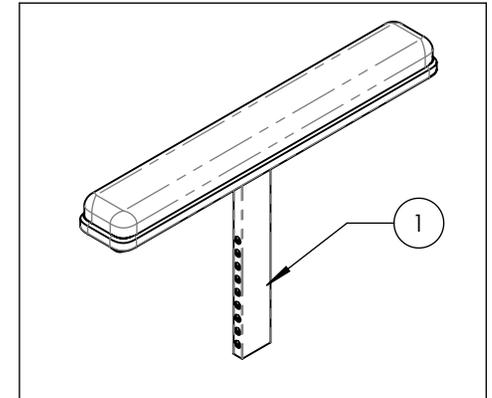



9002936B-00  
 STRUCTURE - GARNITURE GEL, 10-14po,  
 LONGUE, GAUCHE

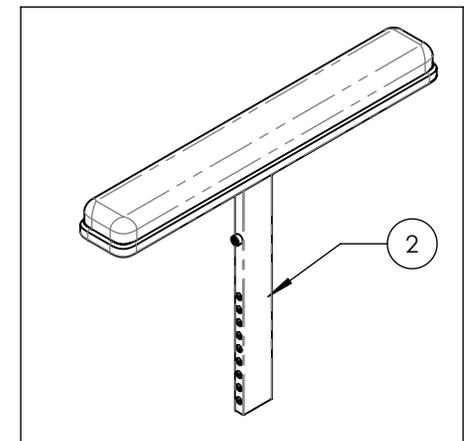


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9003551B\_9003552B**  
**APPUI-BRAS - TYPE T, DROIT, 8-12 po**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                       | 9003551 | 9003552 |
|----------|-------------|---|---------|---------|
| 1        | 0033596B-00 | APPUI BRAS V2T - ASSEMBLAGE                       | 1       | 1       |
| 2        | 9010394B-00 | STRUCTURE - GARNITURE STD, 8-12po, COURTE, DROITE | 1       | -       |
| 3        | 9010396B-00 | STRUCTURE - GARNITURE STD, 8-12po, LONGUE, DROITE | -       | 1       |

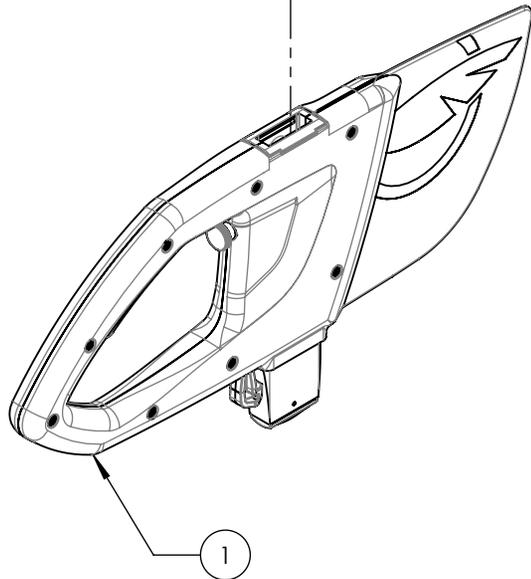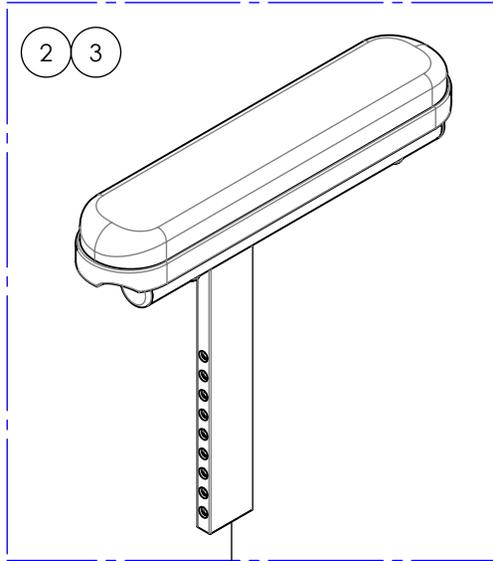

9003551B-00  
 APPUI-BRAS - TYPE T, DROITE, 8-12po, COURT

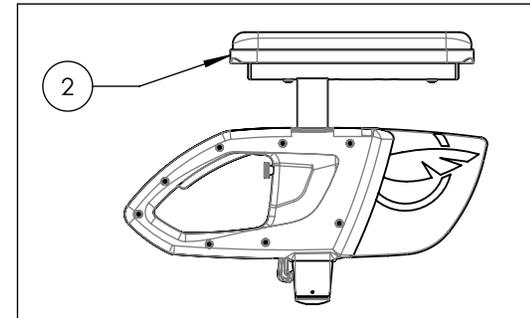



9003552B-00  
 APPUI-BRAS - TYPE T, DROITE, 8-12po, LONG

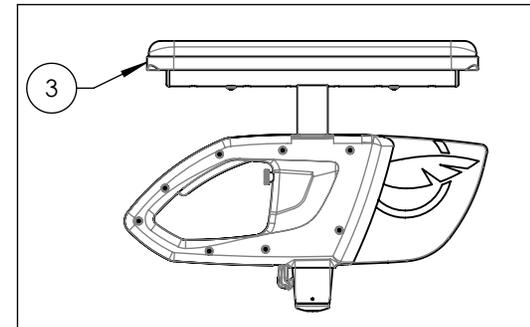


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9003553B\_9003554B**  
**APPUI-BRAS - TYPE T, DROIT, 10-14 po**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION  | 9003553 | 9003554 |
|----------|-------------|--|---------|---------|
| 1        | 0033596B-00 | APPUI BRAS V2T - ASSEMBLAGE                        | 1       | 1       |
| 2        | 9010395B-00 | STRUCTURE - GARNITURE STD, 10-14po, COURTE, DROITE | 1       | -       |
| 3        | 9010397B-00 | STRUCTURE - GARNITURE STD, 10-14po, LONGUE, DROITE | -       | 1       |

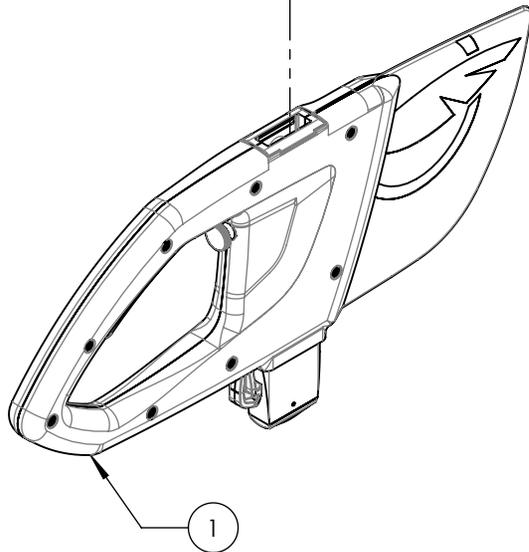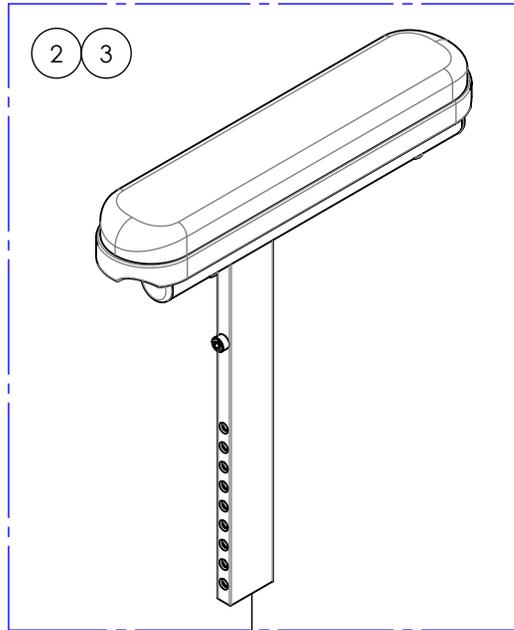

9003553B-00  
 APPUI-BRAS - TYPE T, DROITE, 10-14po, COURT

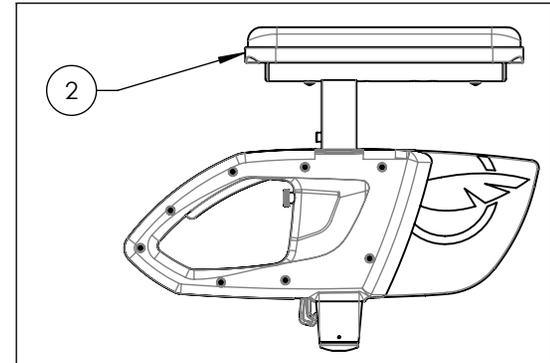



9003554B-00  
 APPUI-BRAS - TYPE T, DROITE, 10-14po, LONG

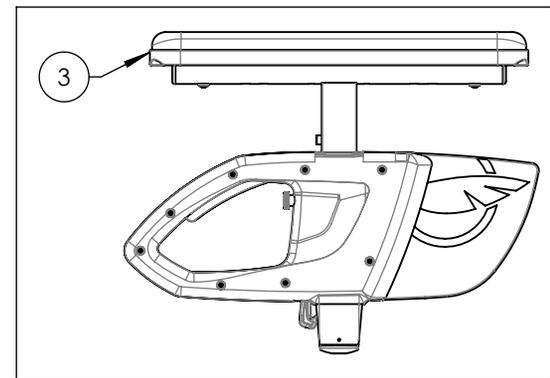


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9003555B\_9003556B**  
**APPUI-BRAS - TYPE T, GAUCHE, 8-12 po**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                       | 9003555 | 9003556 |
|----------|-------------|---|---------|---------|
| 1        | 0033596B-00 | APPUI BRAS V2T - ASSEMBLAGE                       | 1       | 1       |
| 2        | 9010398B-00 | STRUCTURE - GARNITURE STD, 8-12po, COURTE, GAUCHE | 1       | -       |
| 3        | 9010400B-00 | STRUCTURE - GARNITURE STD, 8-12po, LONGUE, GAUCHE | -       | 1       |

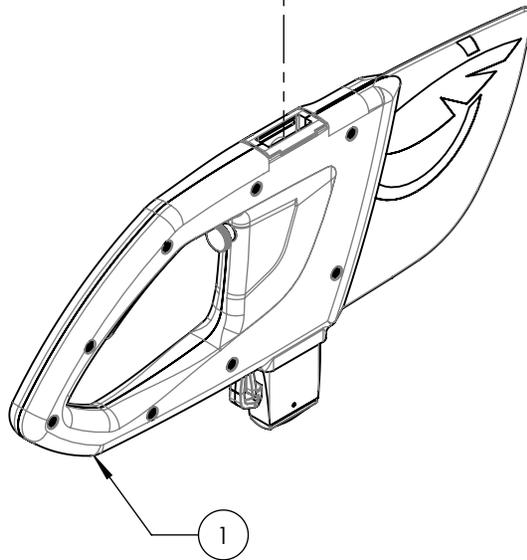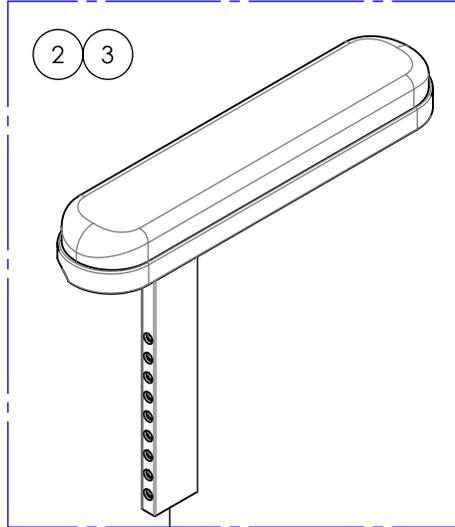

9003555B-00  
 APPUI-BRAS - TYPE T, GAUCHE, 8-12po, COURT

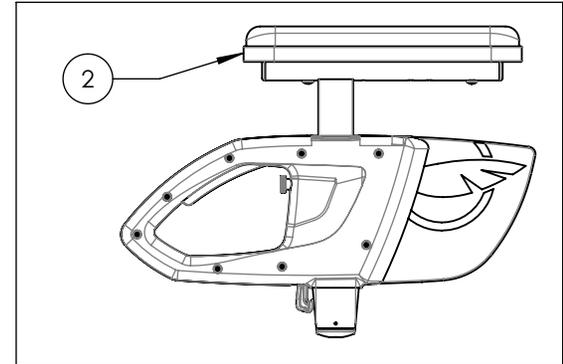



9003556B-00  
 APPUI-BRAS - TYPE T, GAUCHE, 8-12po, LONG

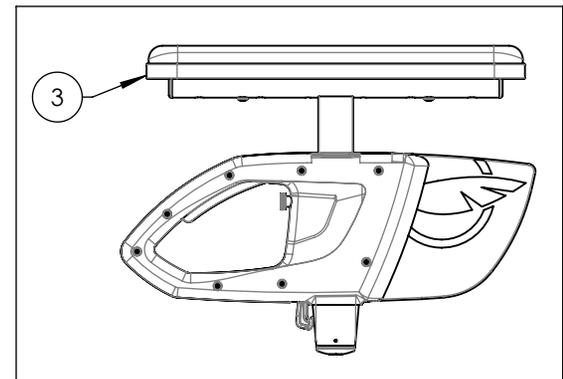


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9003557B\_9003558B**  
**APPUI-BRAS - TYPE T, GAUCHE, 10-14 po**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION  | 9003557 | 9003558 |
|----------|-------------|--|---------|---------|
| 1        | 0033596B-00 | APPUI BRAS V2T - ASSEMBLAGE                        | 1       | 1       |
| 2        | 9010399B-00 | STRUCTURE - GARNITURE STD, 10-14po, COURTE, GAUCHE | 1       | -       |
| 3        | 9010401B-00 | STRUCTURE - GARNITURE STD, 10-14po, LONGUE, GAUCHE | -       | 1       |

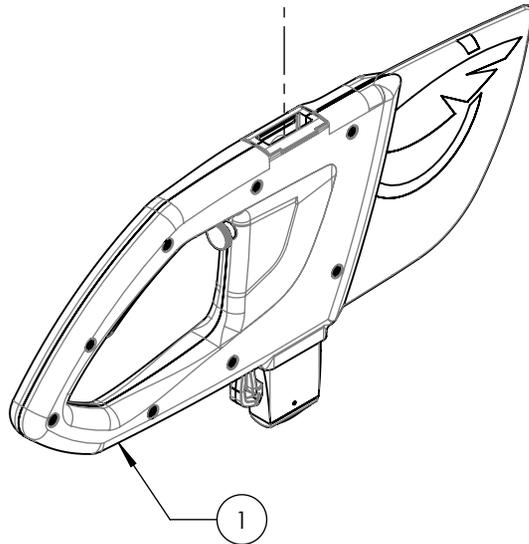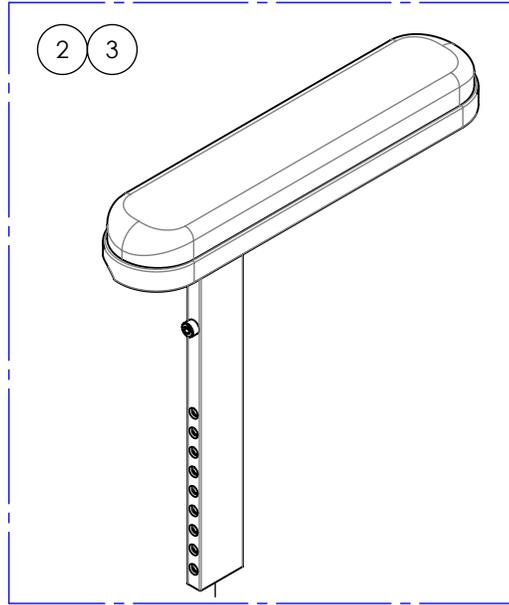

9003557B-00  
 APPUI-BRAS - TYPE T, GAUCHE, 10-14po, COURT

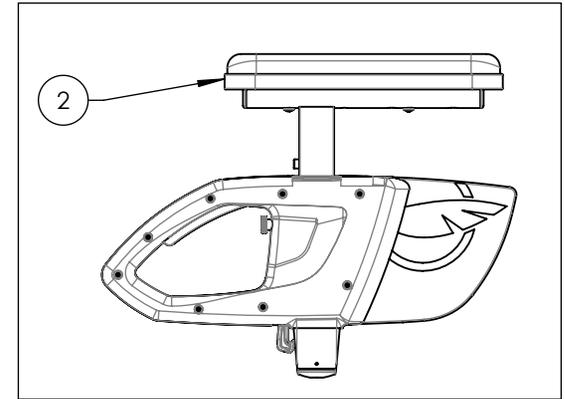


9003558B-00  
 APPUI-BRAS - TYPE T, GAUCHE, 10-14po, LONG

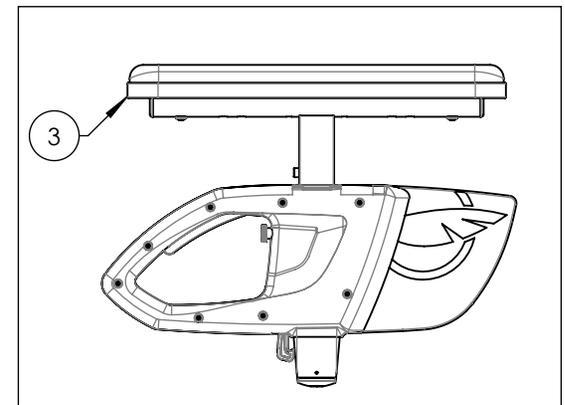


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9007814B 9007815B**  
**STRUCTURE - WATERFALL, LONGUE, DROITE**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                  | 9007814 | 9007815 |
|----------|-------------|--|---------|---------|
| 1        | 0033559B-00 | STRUCT APPUI-BRAS V3 LONG 8-12po             | 1       | -       |
| 2        | 0033560B-00 | STRUCT APPUI-BRAS V3 LONG 10-14po            | -       | 1       |
| 3        | 0033169B-00 | GARNITURE APPUI BRAS INVACARE WATERFALL LONG | 1       | 1       |
| 4        | 0091079A-00 | VIS TÊTE CYL LARGE PHILLIPS #10-32 X 1po L   | 2       | 2       |

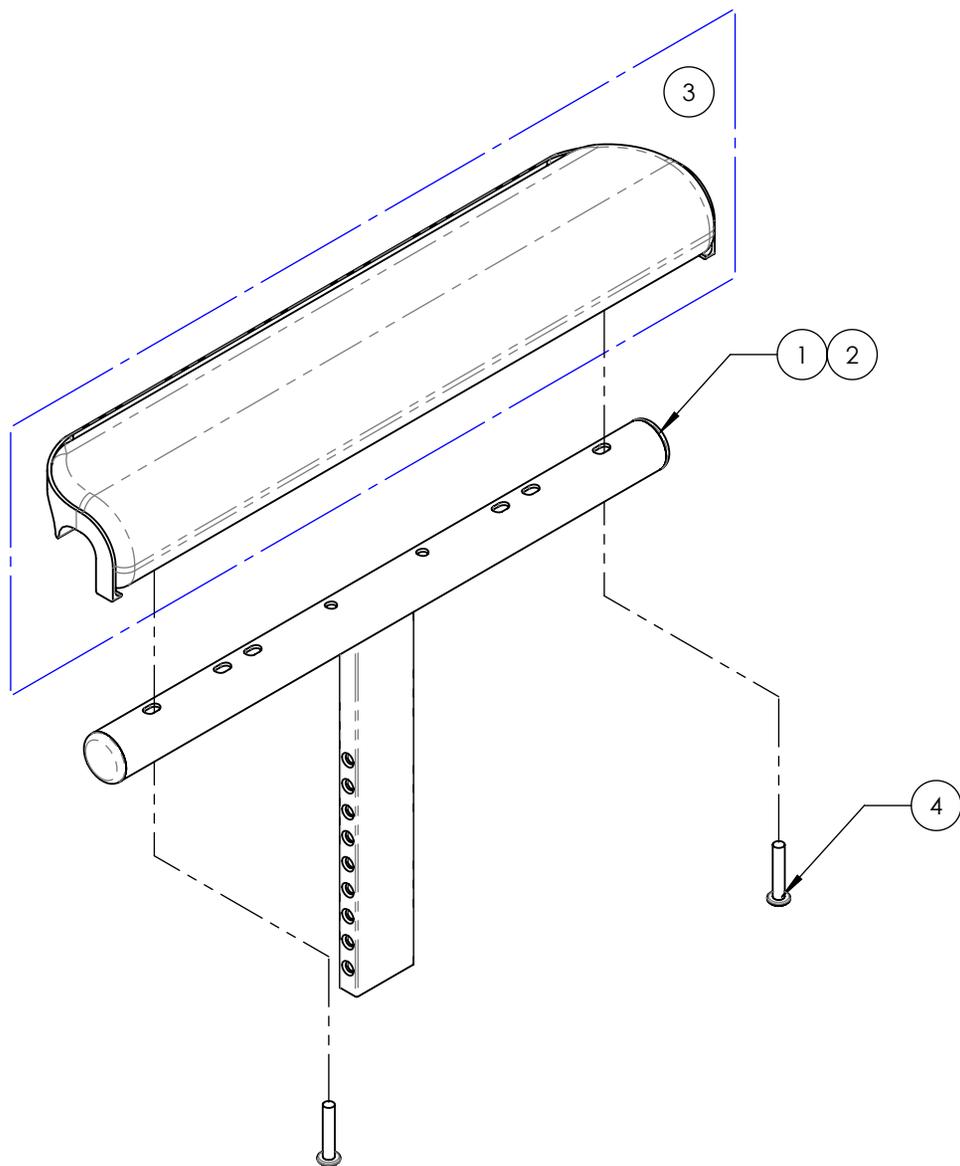

9007814B-00  
 STRUCTURE - WATERFALL, 8-12po,  
 LONGUE, DROITE

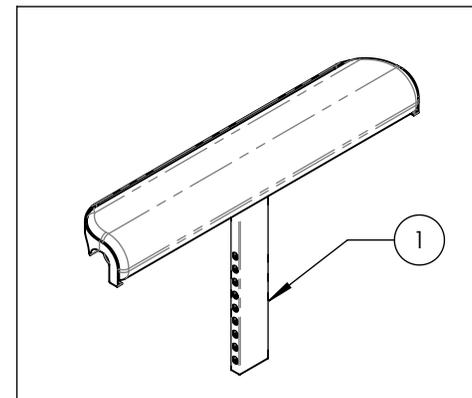


9007815B-00  
 STRUCTURE - WATERFALL, 10-14po,  
 LONGUE, DROITE

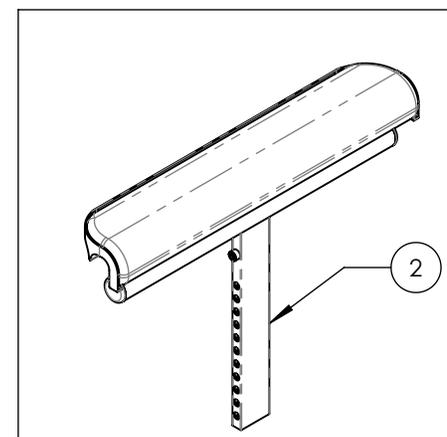


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9007816B 9007817B**  
**STRUCTURE - WATERFALL, LONGUE, GAUCHE**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                  | 9007816 | 9007817 |
|----------|-------------|--|---------|---------|
| 1        | 0033559B-00 | STRUCT APPUI-BRAS V3 LONG 8-12po             | 1       | -       |
| 2        | 0033560B-00 | STRUCT APPUI-BRAS V3 LONG 10-14po            | -       | 1       |
| 3        | 0033169B-00 | GARNITURE APPUI BRAS INVACARE WATERFALL LONG | 1       | 1       |
| 4        | 0091079A-00 | VIS TÊTE CYL LARGE PHILLIPS #10-32 X 1po L   | 2       | 2       |

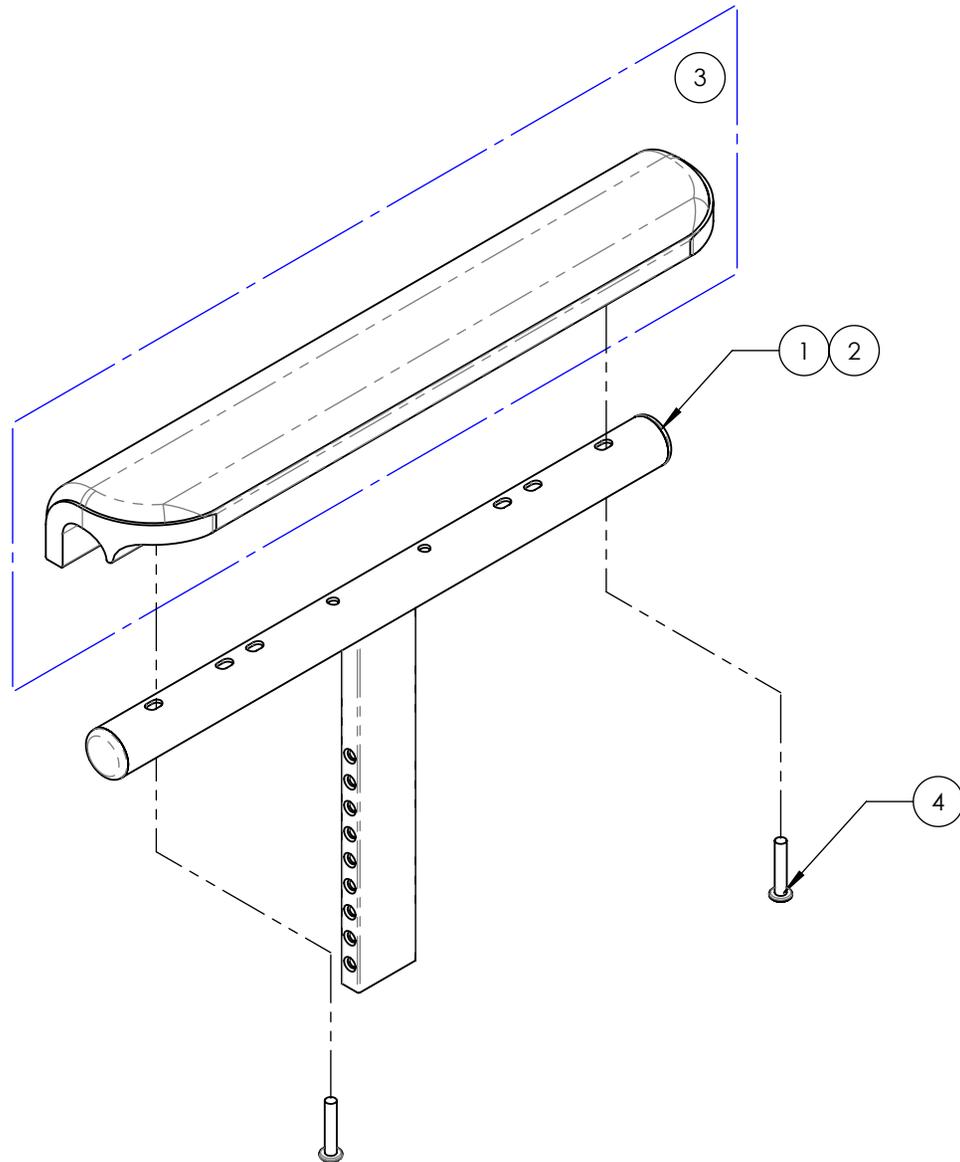

9007816B-00  
 STRUCTURE - WATERFALL, 8-12po,  
 LONGUE, GAUCHE

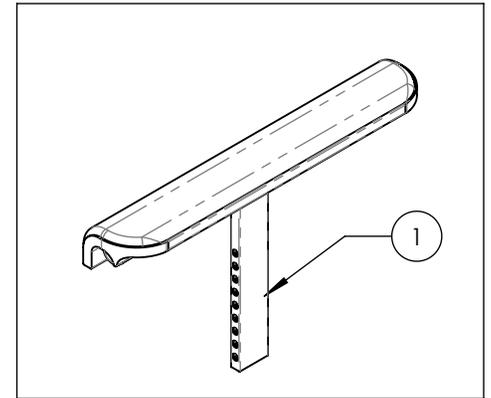


9007817B-00  
 STRUCTURE - WATERFALL, 10-14po,  
 LONGUE, GAUCHE

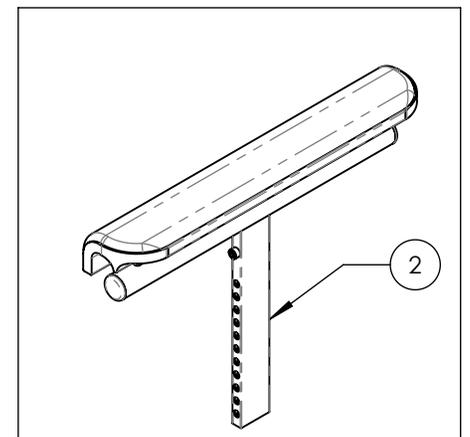

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES










**9007818B-00**  
**GARNITURE - WATERFALL, LONGUE**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                  | Default |
|----------|-------------|--|---------|
| 1        | 0033169B-00 | GARNITURE APPUI BRAS INVACARE WATERFALL LONG | 1       |
| 2        | 0091079A-00 | VIS TÊTE CYL LARGE PHILLIPS #10-32 X 1po L   | 2       |

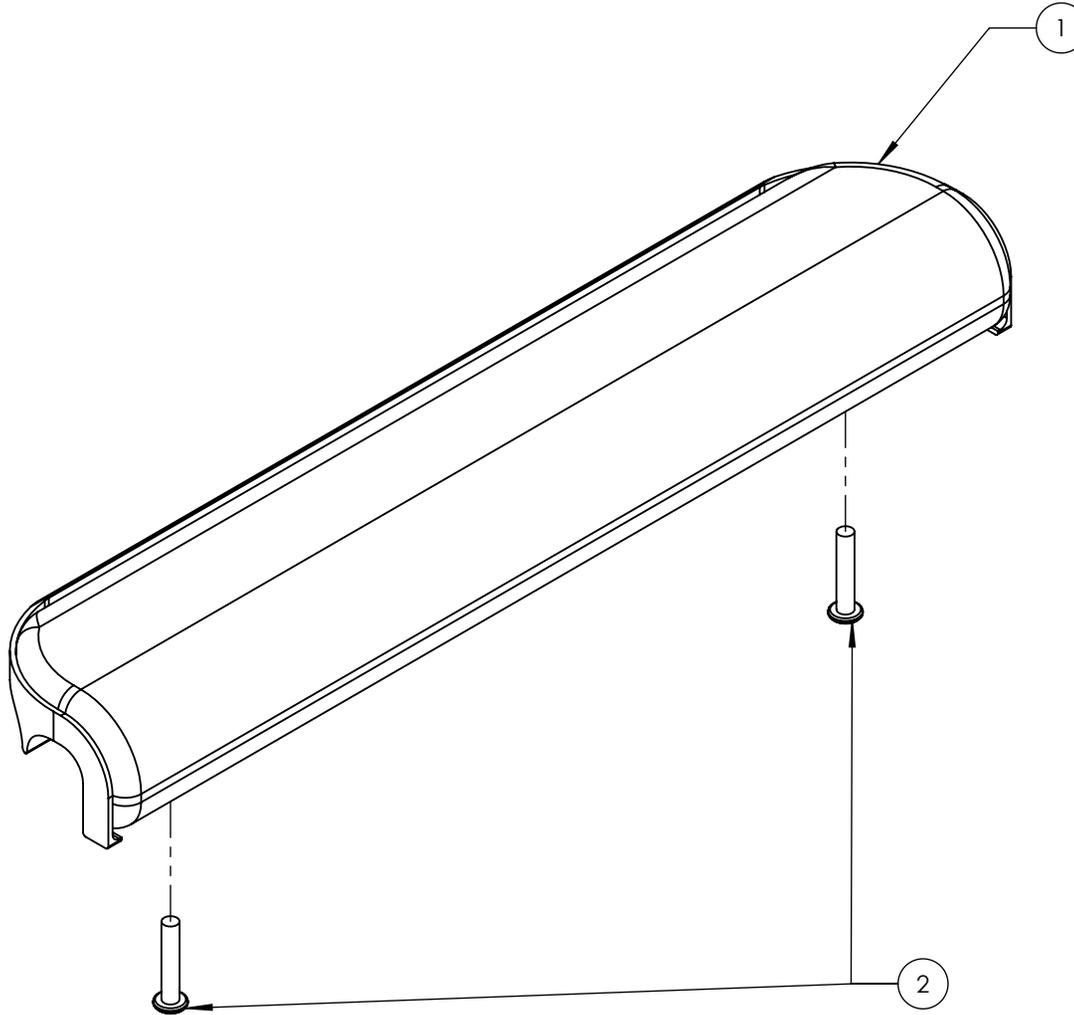


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**APPUI-BRAS STANDARD**

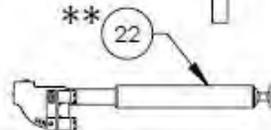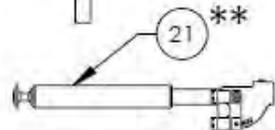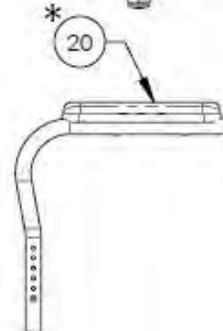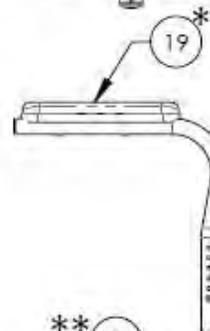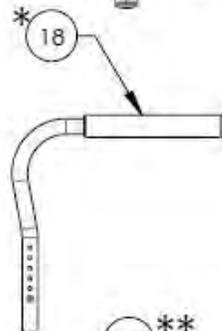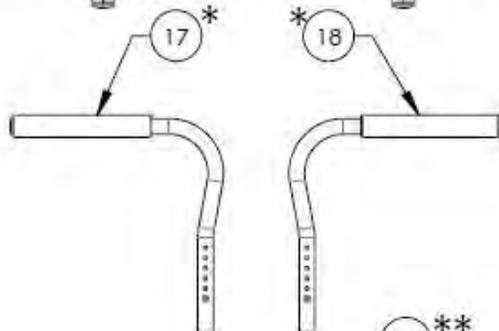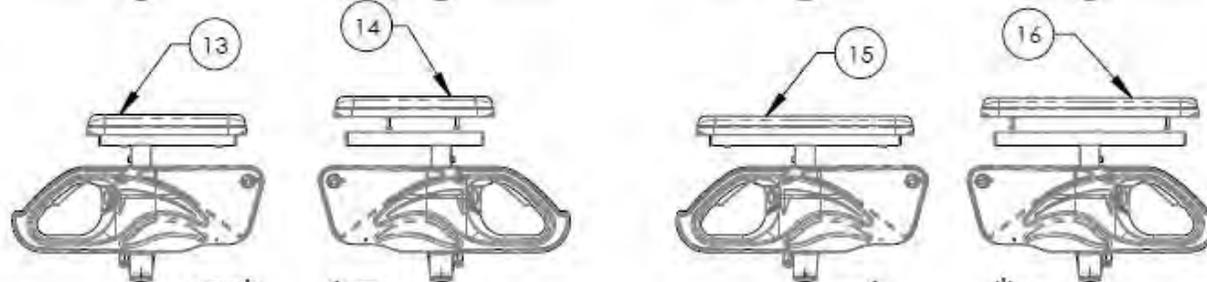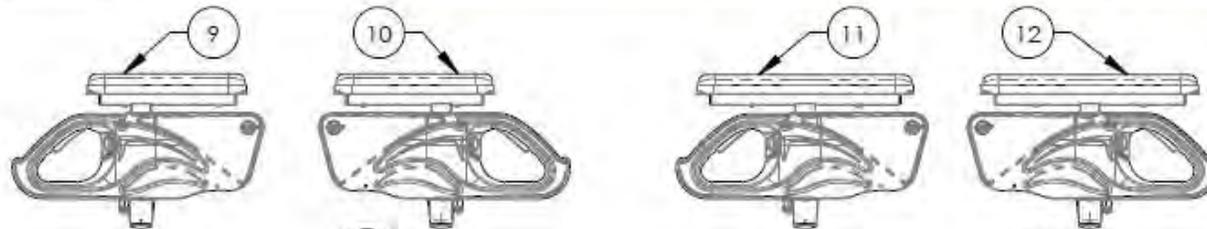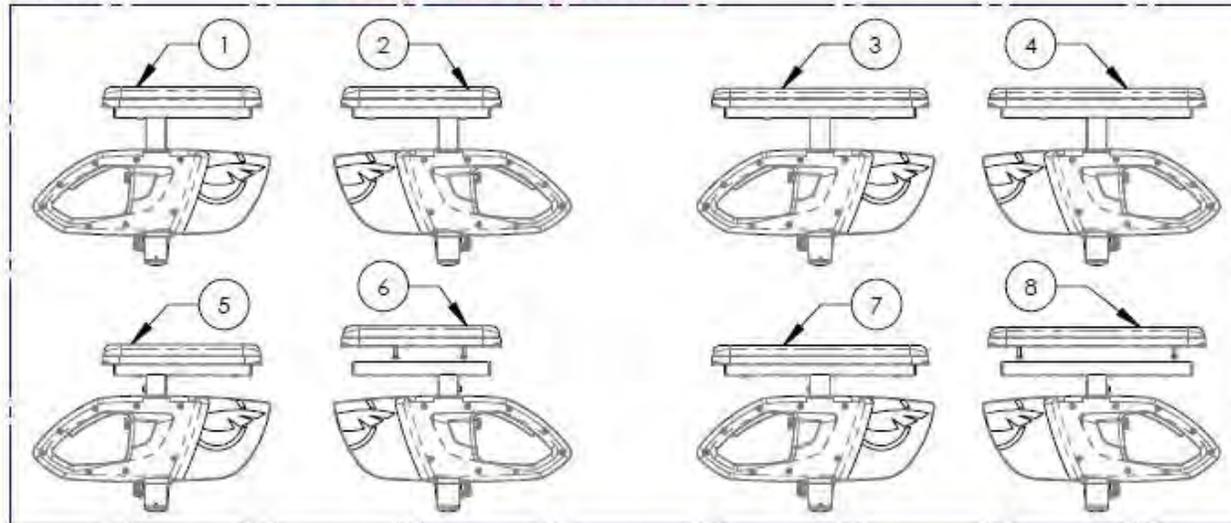

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                     | QTÉ |
|----------|-------------|---|-----|
| 1        | 9003551A-00 | APPUI-BRAS - TYPE T, DROITE, 8-12po, COURT      | 1   |
| 2        | 9003555A-00 | APPUI-BRAS - TYPE T, GAUCHE, 8-12po, COURT      | 1   |
| 3        | 9003552A-00 | APPUI-BRAS - TYPE T, DROITE, 8-12po, LONG       | 1   |
| 4        | 9003556A-00 | APPUI-BRAS - TYPE T, GAUCHE, 8-12po, LONG       | 1   |
| 5        | 9003553A-00 | APPUI-BRAS - TYPE T, DROITE, 10-14po, COURT     | 1   |
| 6        | 9003557A-00 | APPUI-BRAS - TYPE T, GAUCHE, 10-14po, COURT     | 1   |
| 7        | 9003554A-00 | APPUI-BRAS - TYPE T, DROITE, 10-14po, LONG      | 1   |
| 8        | 9003558A-00 | APPUI-BRAS - TYPE T, GAUCHE, 10-14po, LONG      | 1   |
| 9        | 9001299A-00 | APPUI-BRAS - TYPE T & U, DROITE, 8-12po, COURT  | 1   |
| 10       | 9001303A-00 | APPUI-BRAS - TYPE T & U, GAUCHE, 8-12po, COURT  | 1   |
| 11       | 9001300A-00 | APPUI-BRAS - TYPE T & U, DROITE, 8-12po, LONG   | 1   |
| 12       | 9001304A-00 | APPUI-BRAS - TYPE T & U, GAUCHE, 8-12po, LONG   | 1   |
| 13       | 9001301A-00 | APPUI-BRAS - TYPE T & U, DROITE, 10-14po, COURT | 1   |
| 14       | 9001305A-00 | APPUI-BRAS - TYPE T & U, GAUCHE, 10-14po, COURT | 1   |
| 15       | 9001302A-00 | APPUI-BRAS - TYPE T & U, DROITE, 10-14po, LONG  | 1   |
| 16       | 9001306A-00 | APPUI-BRAS - TYPE T & U, GAUCHE, 10-14po, LONG  | 1   |
| 17*      | 9001308A-00 | APPUI-BRAS - TYPE L, DROITE, TUBULAIRE          | 1   |
| 18*      | 9001309A-00 | APPUI-BRAS - TYPE L, GAUCHE, TUBULAIRE          | 1   |
| 19*      | 9001310A-00 | APPUI-BRAS - TYPE L, DROITE, GARNITURE COURTE   | 1   |
| 20*      | 9001311A-00 | APPUI-BRAS - TYPE L, GAUCHE, GARNITURE COURTE   | 1   |
| 21**     | 0033503A-00 | APPUI BRAS EN I, DROITE - ASSY                  | 1   |
| 22**     | 0033504A-00 | APPUI BRAS EN I, GAUCHE - ASSY                  | 1   |
| 23       | 0007400A-00 | APPUI-BRAS - TYPE T, DROITE, 6-10 po, COURT     | 1   |
| 24       | 0007402A-00 | APPUI-BRAS - TYPE T, GAUCHE, 6-10 po, COURT     | 1   |
| 25       | 0007400A-01 | APPUI-BRAS - TYPE T, DROITE, 6-10 po, LONG      | 1   |
| 26       | 0007402A-01 | APPUI-BRAS - TYPE T, GAUCHE, 6-10 po, LONG      | 1   |




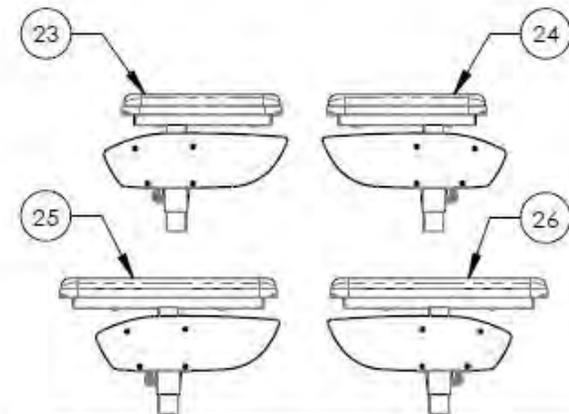


\*: NON DISPONIBLE AVEC LES DOSSIERS AJUSTABLE EN PROFONDEUR  
 \*\*: À UTILISER SEULEMENT AVEC MONTANTS DE DOSSIER EN ALUMINIUM (175lbs MAX)

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue d'appui-bras**  
**Appui-bras - Garniture en gel**



| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION  | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 1        | 9002932A-00 | GARNITURE - GEL, LONGUE                            | 1   |
| 2        | 9002933B-00 | STRUCTURE - GARNITURE GEL, 8-12po, LONGUE, DROITE  | 1   |
| 3        | 9002934B-00 | STRUCTURE - GARNITURE GEL, 10-14po, LONGUE, DROITE | 1   |
| 4        | 9002935B-00 | STRUCTURE - GARNITURE GEL, 8-12po, LONGUE, GAUCHE  | 1   |
| 5        | 9002936B-00 | STRUCTURE - GARNITURE GEL, 10-14po, LONGUE, GAUCHE | 1   |

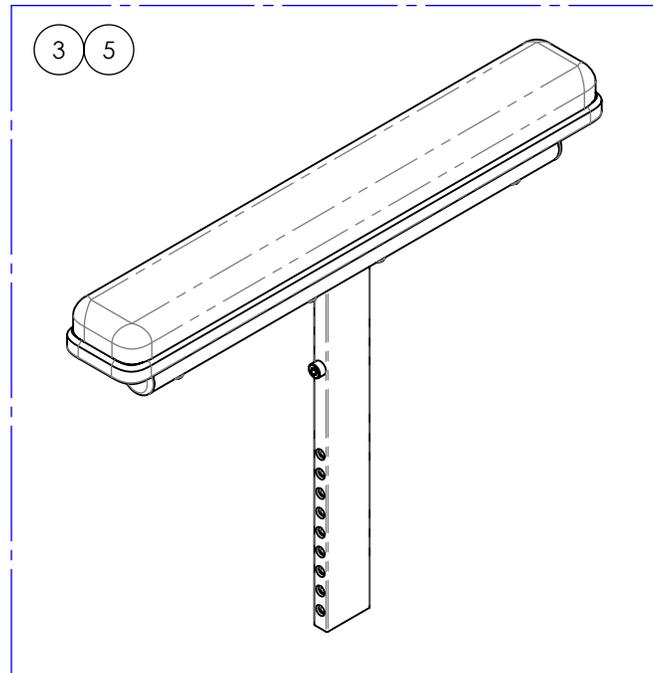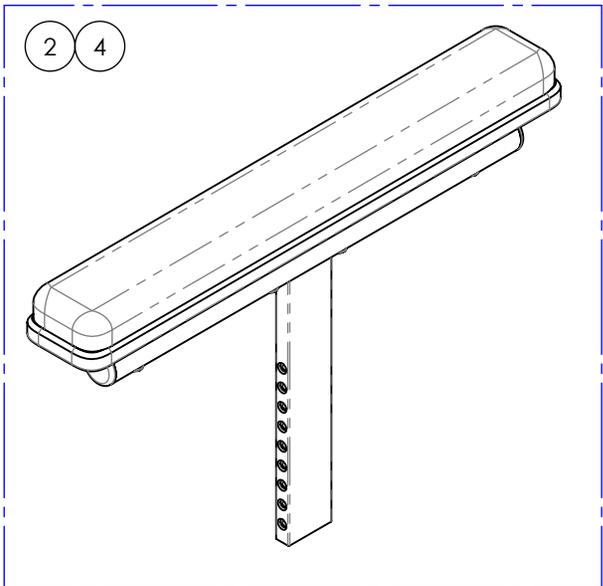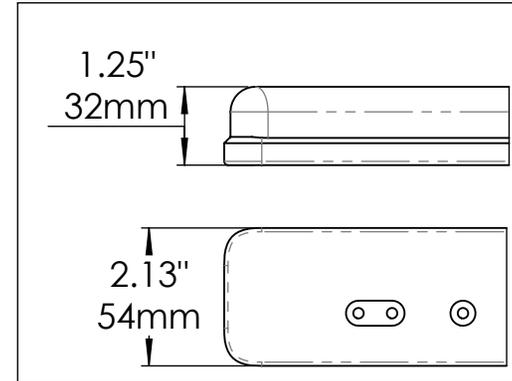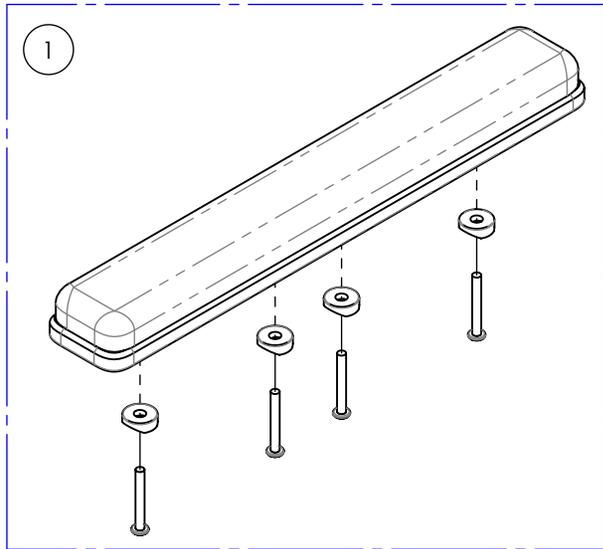

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue d'appui-bras**  
**Appui-bras - Receptacle type T**



| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION              | QTÉ |
|----------|-------------|--------------------------|-----|
| 1        | 0004111A-00 | RECEPTACLE APPUI BRAS V3 | 2   |

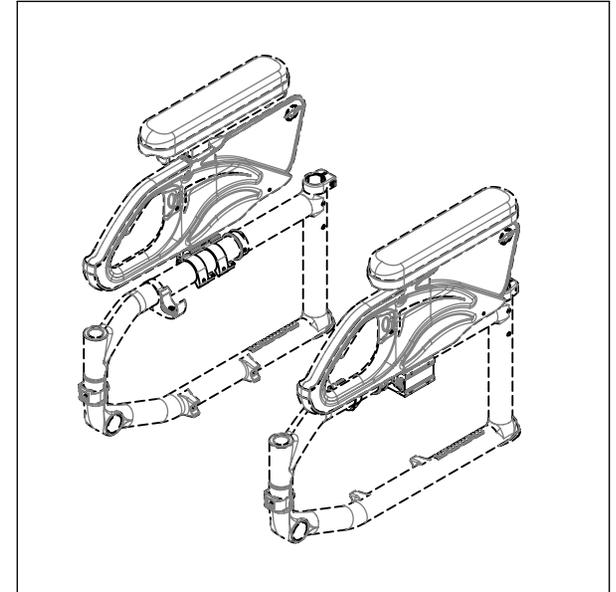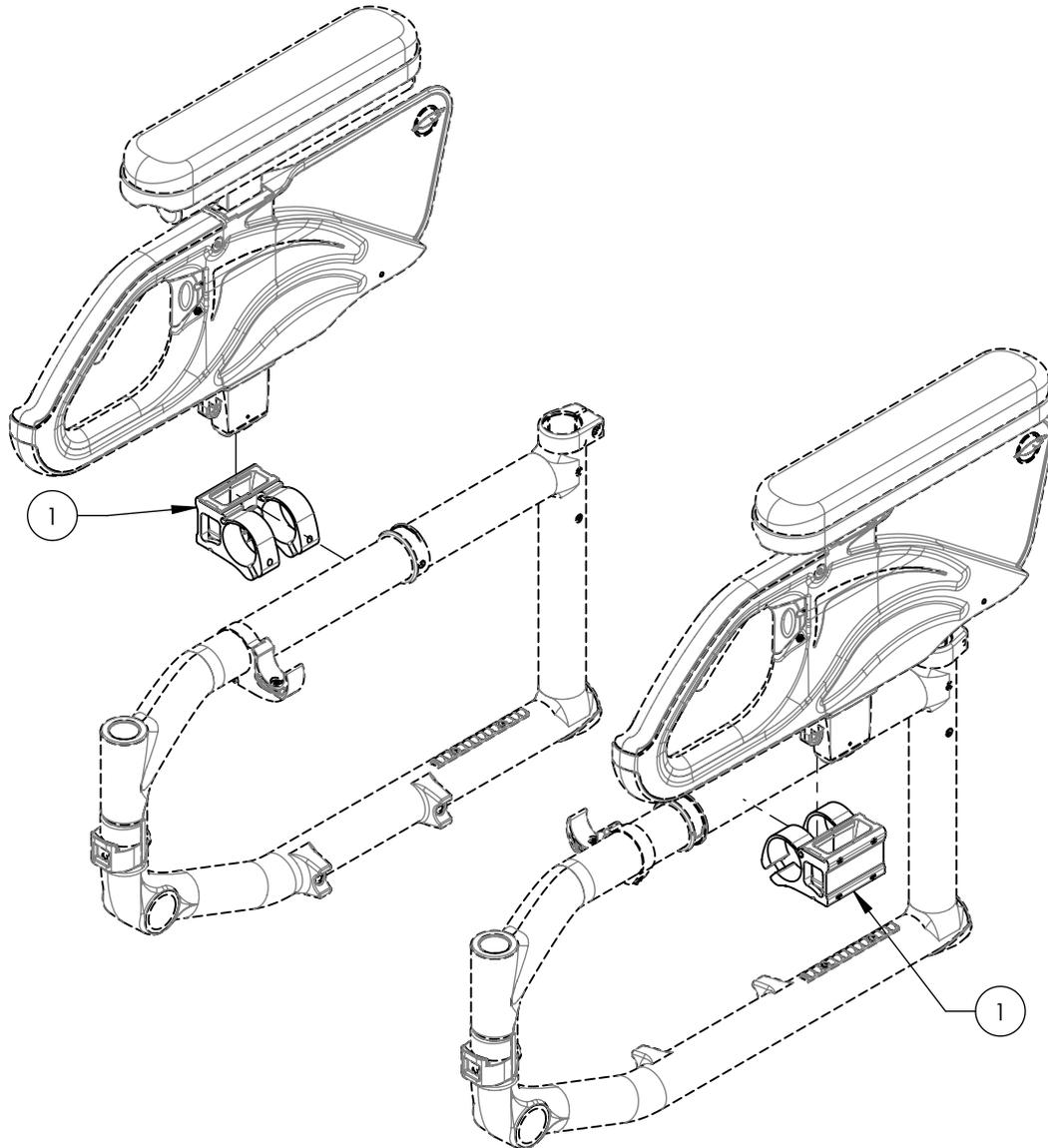

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue d'appui-bras**  
**Appui-bras - Pivot arrière pour type 2**



| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 1        | 9001313A-00 | PIVOT ARRIÈRE - TYPE T & U, DROITE         | 1   |
| 2        | 9001314A-00 | PIVOT ARRIÈRE - TYPE T & U, GAUCHE         | 1   |
| 3        | 9002851A-00 | PIVOT ARRIÈRE CORRIGÉ - TYPE T & U, DROITE | 1   |
| 4        | 9002852A-00 | PIVOT ARRIÈRE CORRIGÉ - TYPE T & U, GAUCHE | 1   |

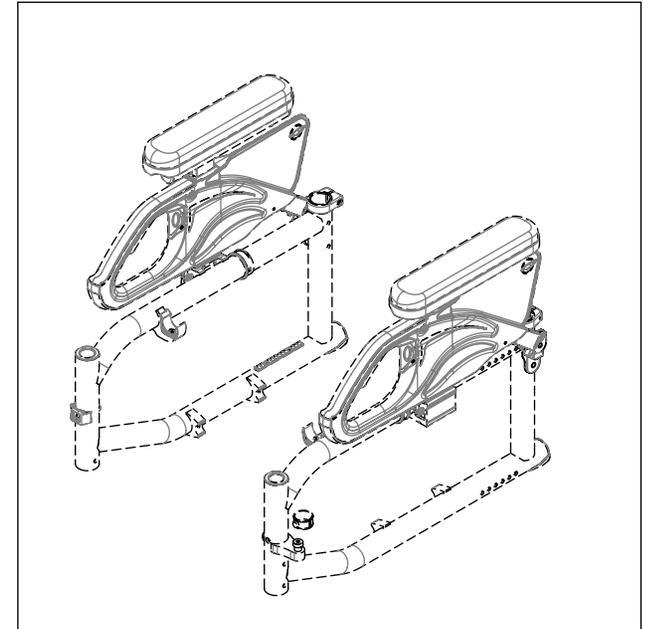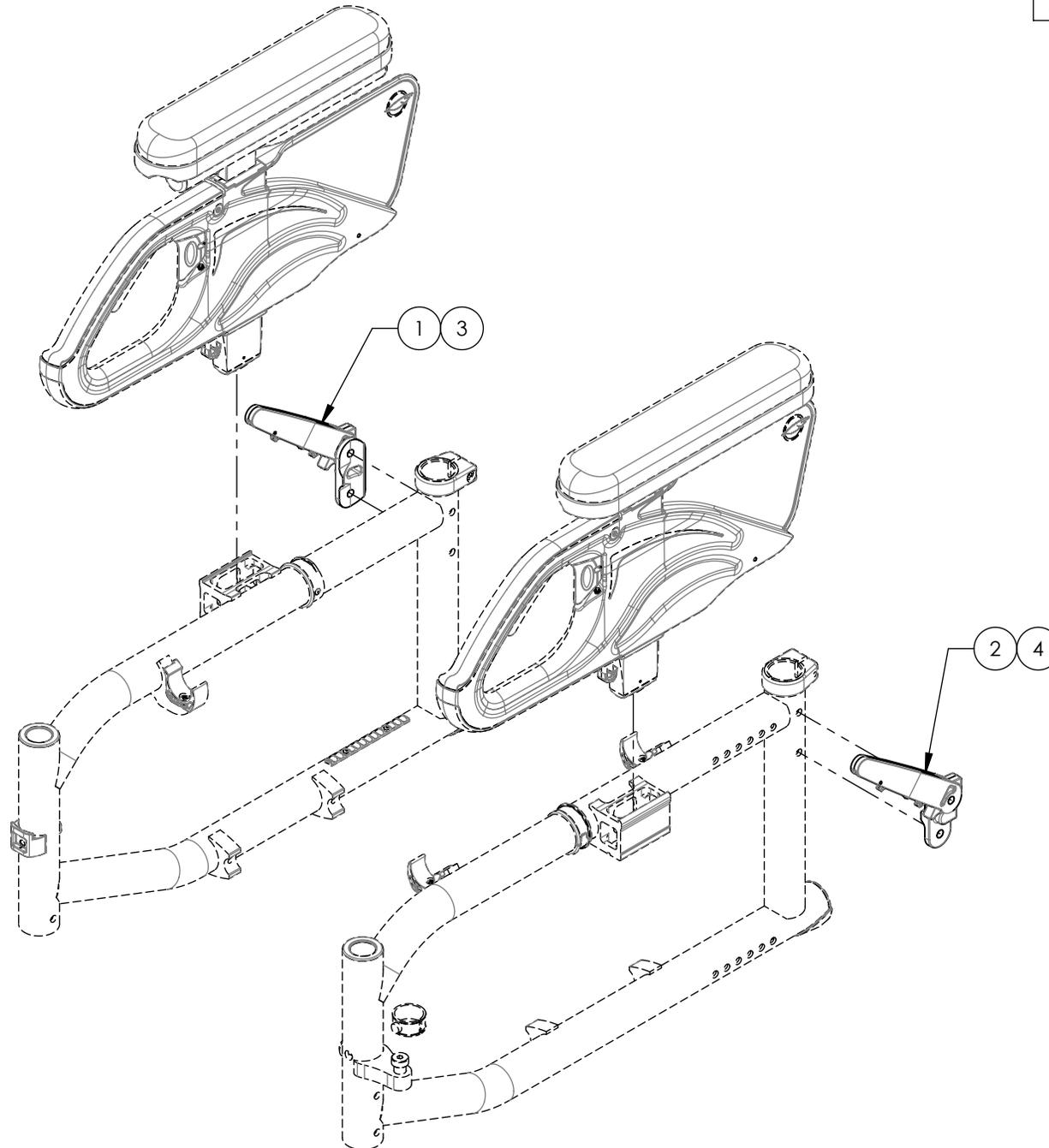

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue d'appui-bras**  
**Appui-bras - Réceptacle Type L**




| No. ITEM | No. PIÈCE       | DESCRIPTION         | QTÉ |
|----------|-----------------|---------------------|-----|
| 1        | 9001315<br>A-00 | Réceptacle - Type L | 2   |

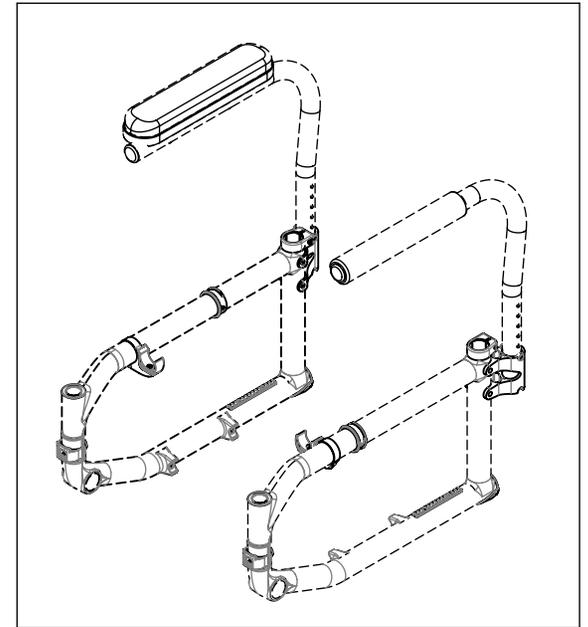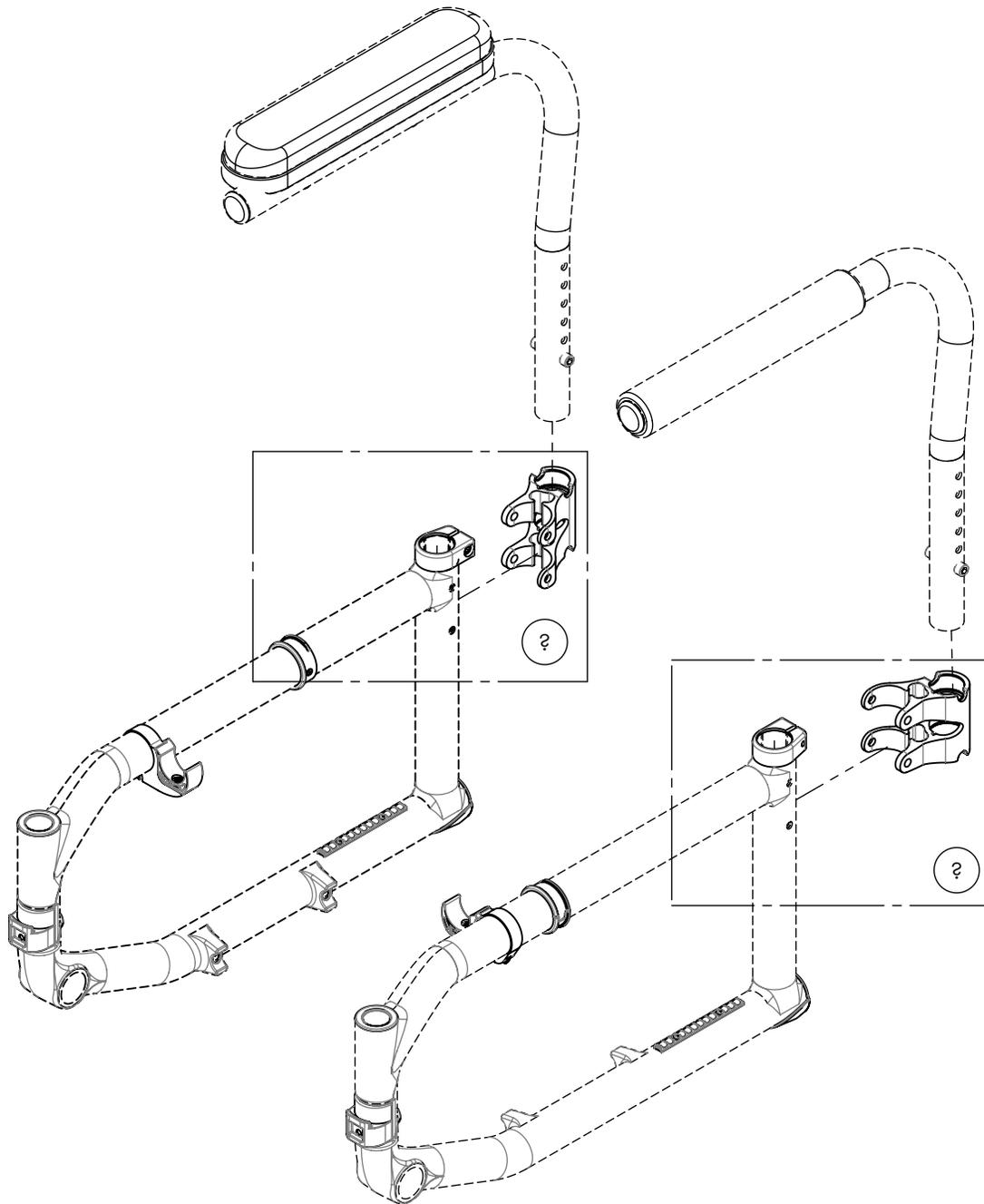

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**CATALOGUE D'APPUI-BRAS**  
**APPUI-BRAS - GARNITURE WATERFALL**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                    | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 1        | 90078188-00 | GARNITURE - WATERFALL, LONGUE                  | 1   |
| 2        | 90078148-00 | STRUCTURE - WATERFALL, 8-12po, LONGUE, DROITE  | 1   |
| 3        | 90078168-00 | STRUCTURE - WATERFALL, 8-12po, LONGUE, GAUCHE  | 1   |
| 4        | 90078158-00 | STRUCTURE - WATERFALL, 10-14po, LONGUE, DROITE | 1   |
| 5        | 90078178-00 | STRUCTURE - WATERFALL, 10-14po, LONGUE, GAUCHE | 1   |

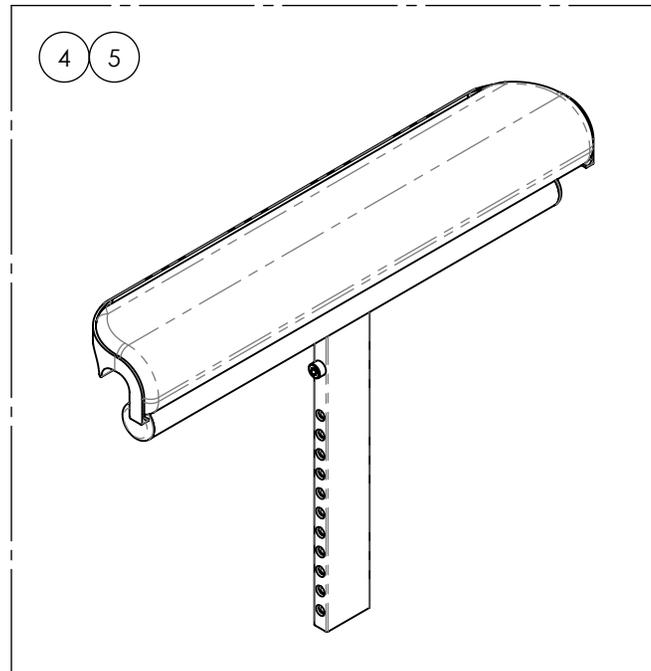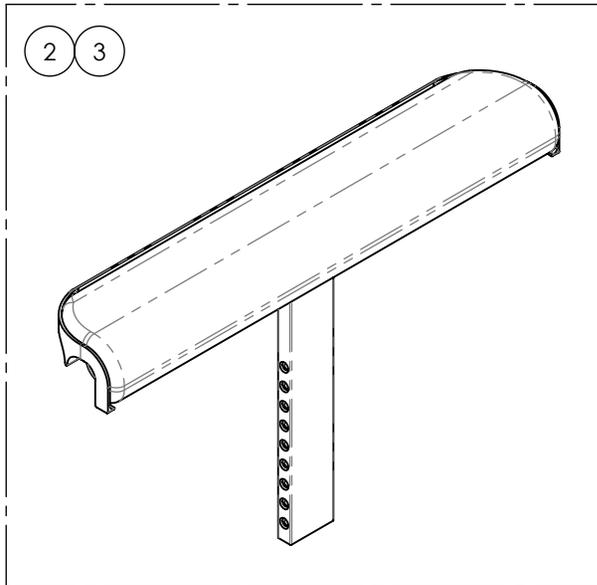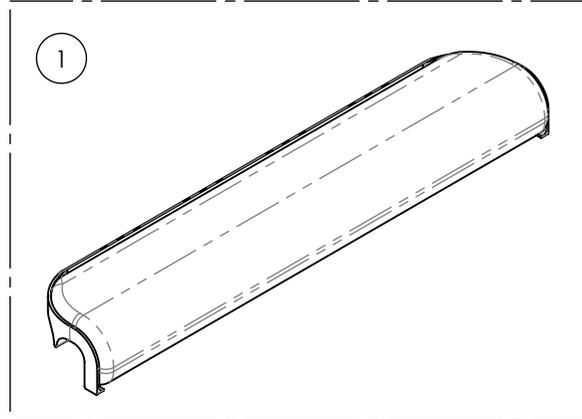


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001289A\_9001291A**  
**PROTÈGE-VÊTEMENTS - FIBRE DE CARBONE, FIXE, DROIT**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                | 9001289 | 9001290 | 9001291 |
|----------|-------------|--|---------|---------|---------|
| 1        | 0051112B-00 | PROTÈGE-VÊTEMENT CARBONE FIXE PETIT - ASSY | 1       | -       | -       |
| 2        | 0051113B-00 | PROTÈGE-VÊTEMENT CARBONE FIXE MOYEN - ASSY | -       | 1       | -       |
| 3        | 0051114B-00 | PROTÈGE-VÊTEMENT CARBONE FIXE GRAND - ASSY | -       | -       | 1       |
| 4        | 0060201A-00 | FRAME SAVER 1¼po                           | 2       | 2       | 2       |
| 5        | 0060202A-00 | FRAME SAVER 1po                            | 1       | 1       | 1       |
| 6        | 0090665A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M6x1x35mm L, 24mm FILET    | 3       | 3       | 3       |

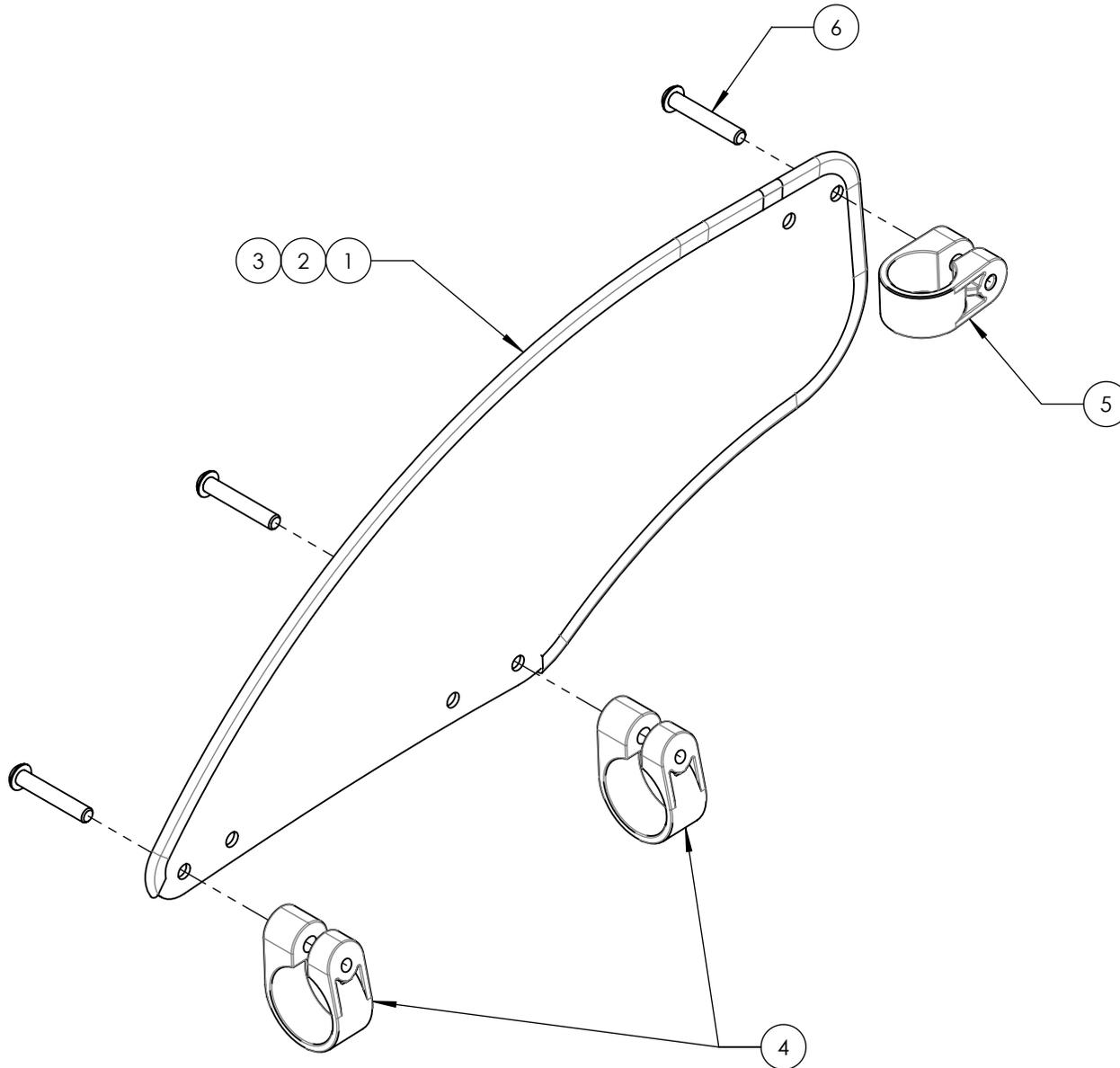


9001289A-00  
 PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, FIXE, DROITE,  
 PETIT

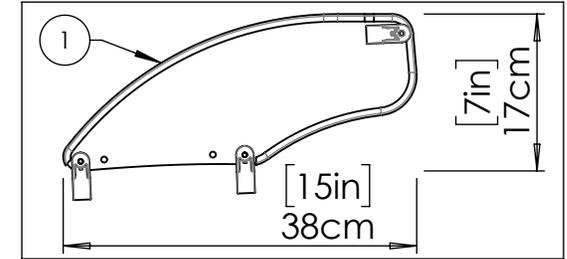

9001290A-00  
 PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, FIXE,  
 DROITE, MOYEN

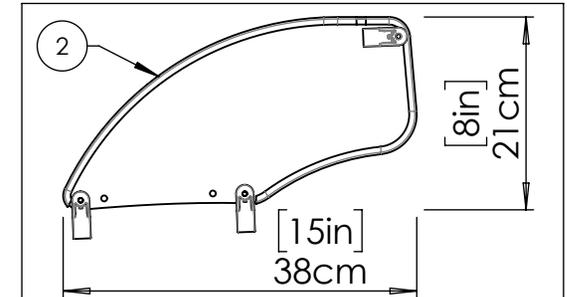


9001291A-00  
 PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, FIXE, DROITE,  
 GRAND

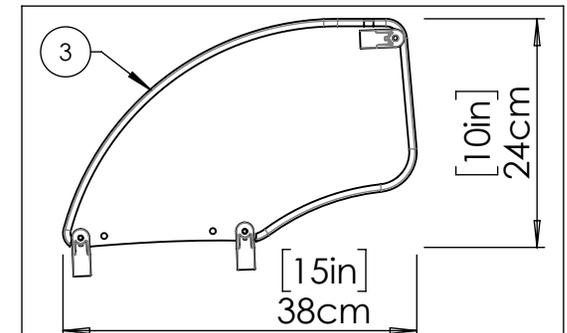


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001292A 9001294A**  
**PROTÈGE-VÊTEMENTS - FIBRE DE CARBONE, FIXE, GAUCHE**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                | 9001292 | 9001293 | 9001294 |
|----------|-------------|--|---------|---------|---------|
| 1        | 0051112B-00 | PROTÈGE-VÊTEMENT CARBONE FIXE PETIT - ASSY | 1       | -       | -       |
| 2        | 0051113B-00 | PROTÈGE-VÊTEMENT CARBONE FIXE MOYEN - ASSY | -       | 1       | -       |
| 3        | 0051114B-00 | PROTÈGE-VÊTEMENT CARBONE FIXE GRAND - ASSY | -       | -       | 1       |
| 4        | 0060201A-00 | FRAME SAVER 1¼po                           | 2       | 2       | 2       |
| 5        | 0060202A-00 | FRAME SAVER 1po                            | 1       | 1       | 1       |
| 6        | 0090665A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M6x1x35mm L, 24mm FILET    | 3       | 3       | 3       |

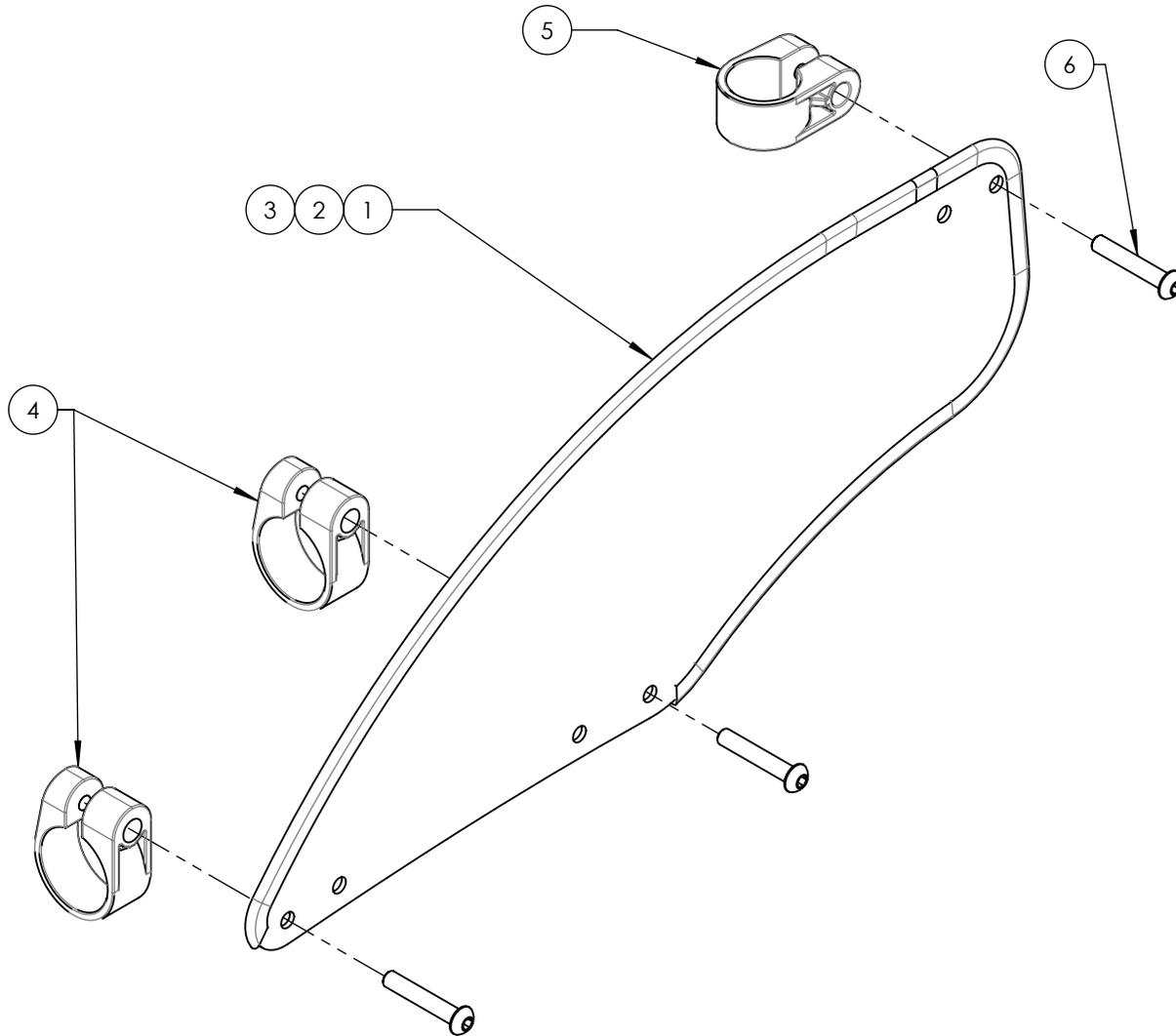


9001292A-00  
 PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, FIXE, GAUCHE, PETIT

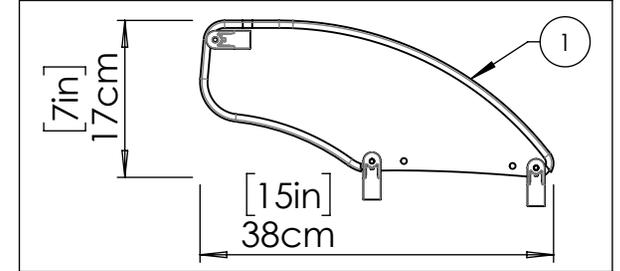

9001293A-00  
 PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, FIXE, GAUCHE, MOYEN

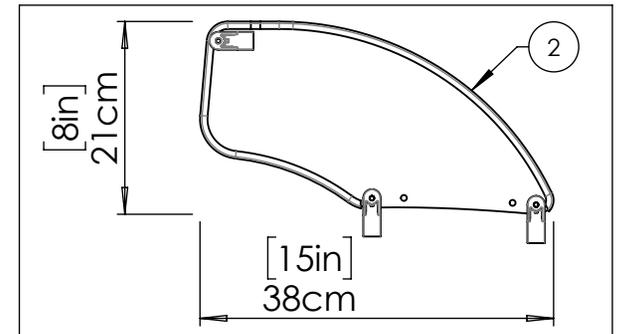


9001294A-00  
 PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, FIXE, GAUCHE, GRAND

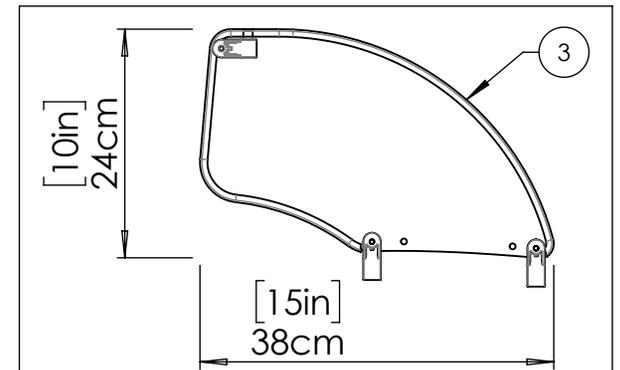


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001295A\_9001296A**  
**PROTÈGE-VÊTEMENTS - PLASTIQUE, AMOVIBLE, DROIT**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                     | 9001295 | 9001296 |
|----------|-------------|---|---------|---------|
| 1        | 0051002A-00 | PROTÈGE-VÊTEMENT PLASTIQUE PETIT - ASSY         | 1       | -       |
| 2        | 0051003A-00 | PROTÈGE-VÊTEMENT PLASTIQUE MOYEN - ASSY         | -       | 1       |
| 3        | 0051118A-00 | PLAQUE AJUSTEMENT GARDE BOUE & PROTÈGE VÊTEMENT | 1       | 1       |
| 4        | 0090631A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M4x0.7x8mm L                    | 4       | 4       |

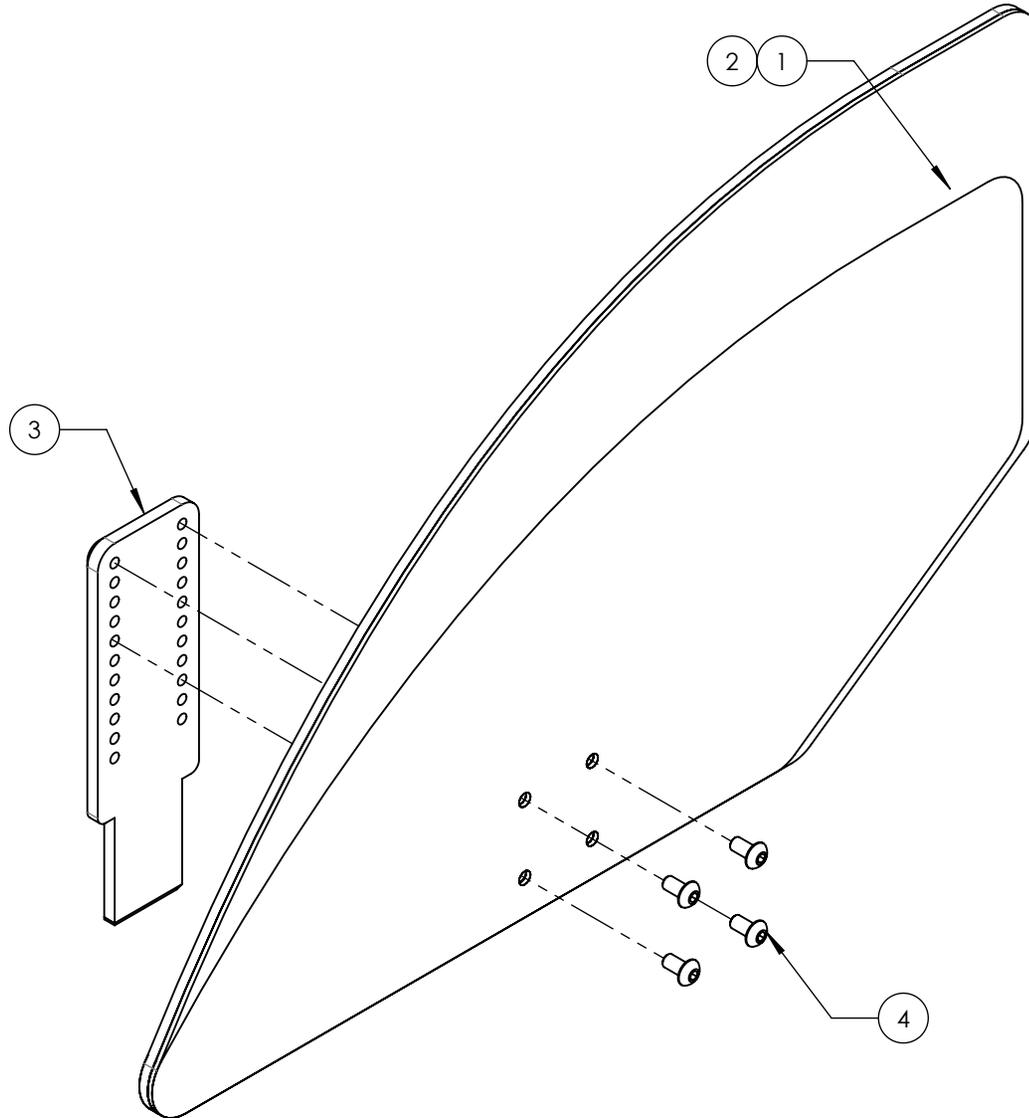

9001295A-00  
 PROTÈGE-VÊTEMENT - PLASTIQUE, DROITE,  
 PETIT

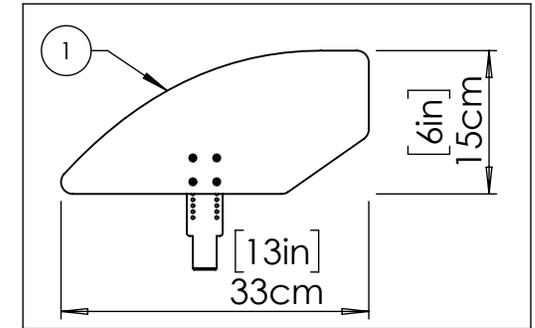


9001296A-00  
 PROTÈGE-VÊTEMENT - PLASTIQUE, DROITE,  
 MOYEN

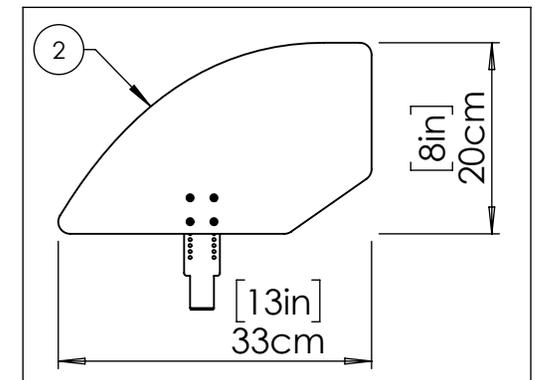


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001297A\_9001298A**  
**PROTÈGE-VÊTEMENTS - PLASTIQUE, AMOVIBLE, GAUCHE**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                     | 9001297 | 9001298 |
|----------|-------------|---|---------|---------|
| 1        | 0051002A-00 | PROTÈGE-VÊTEMENT PLASTIQUE PETIT - ASSY         | 1       | -       |
| 2        | 0051003A-00 | PROTÈGE-VÊTEMENT PLASTIQUE MOYEN - ASSY         | -       | 1       |
| 3        | 0051118A-00 | PLAQUE AJUSTEMENT GARDE BOUE & PROTÈGE VÊTEMENT | 1       | 1       |
| 4        | 0090631A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M4x0.7x8mm L                    | 4       | 4       |

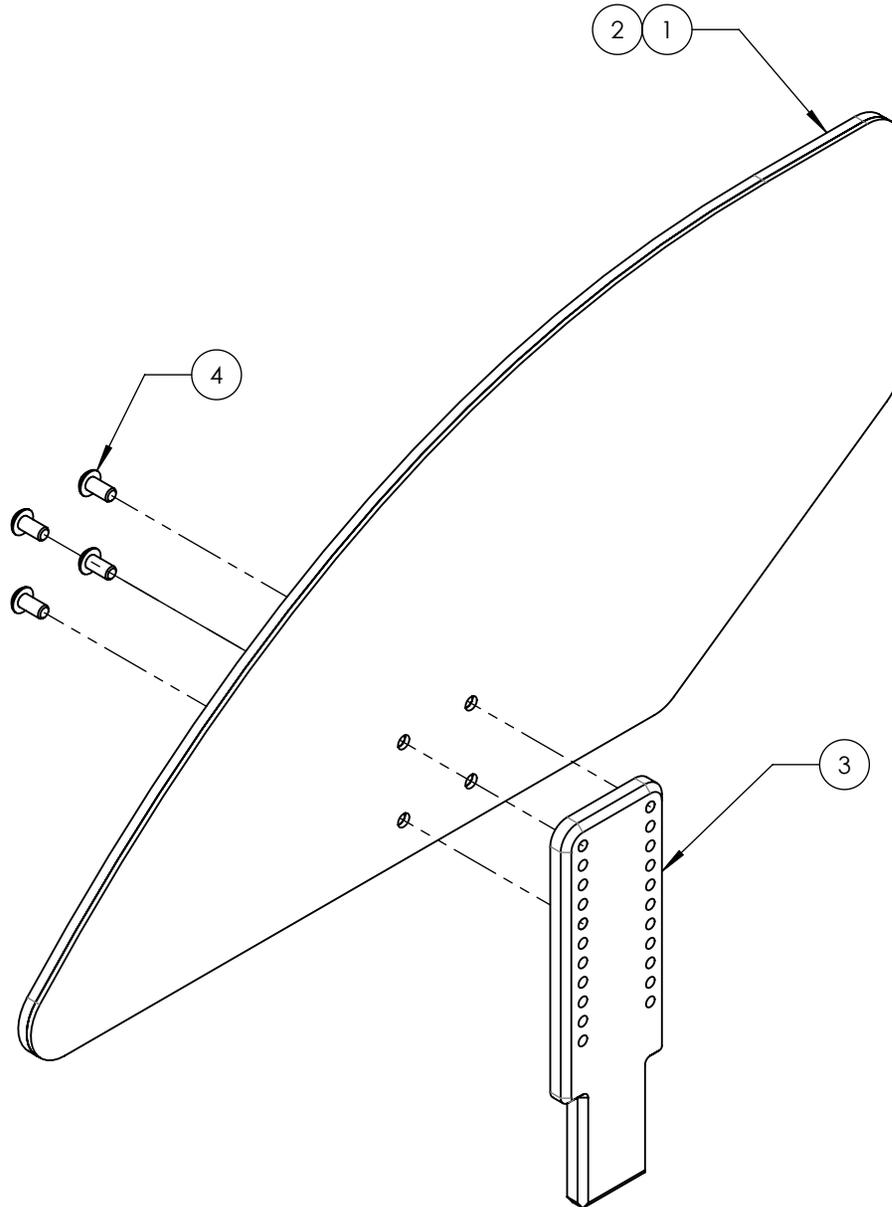

9001297A-00  
 PROTÈGE-VÊTEMENT - PLASTIQUE, GAUCHE, PETIT

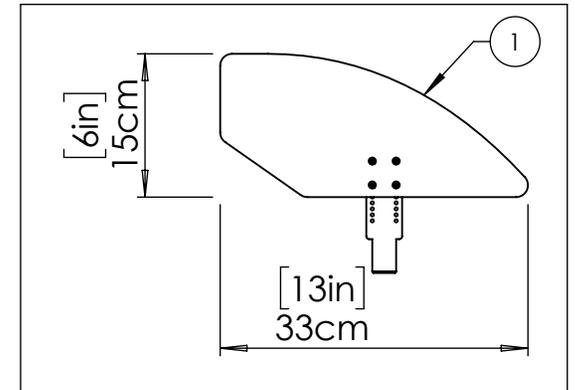



9001298A-00  
 PROTÈGE-VÊTEMENT - PLASTIQUE, GAUCHE, MOYEN

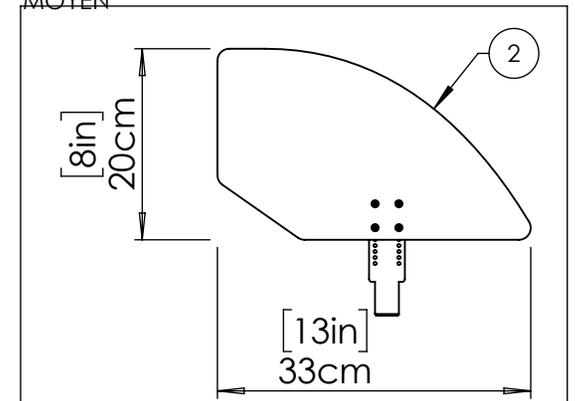

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001307A-00**  
**INSERT - ADAPTEUR RÉCEPTACLE V2**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                   | QTÉ. |
|----------|-------------|---|------|
| 1        | 0051037A-00 | INSERT DE PROTÈGE VÊTEMENT POUR RECEPTACLE V2 | 1    |
| 2        | 0033114A-00 | CHEMISE BAGUE MINCE APPUI BRAS V2             | 2    |
| 3        | 0090914A-00 | GOUPILLE ÉLASTIQUE 18-8, M2x10mm L            | 1    |

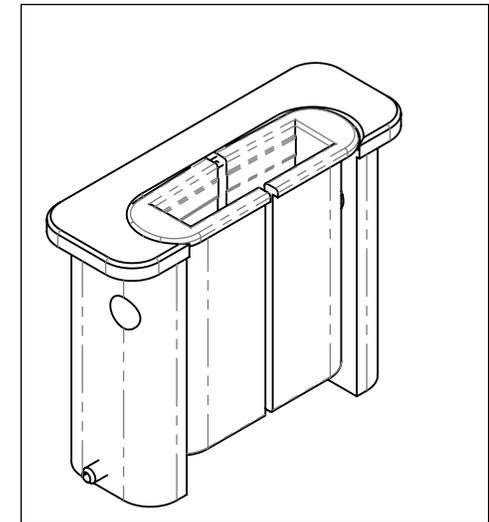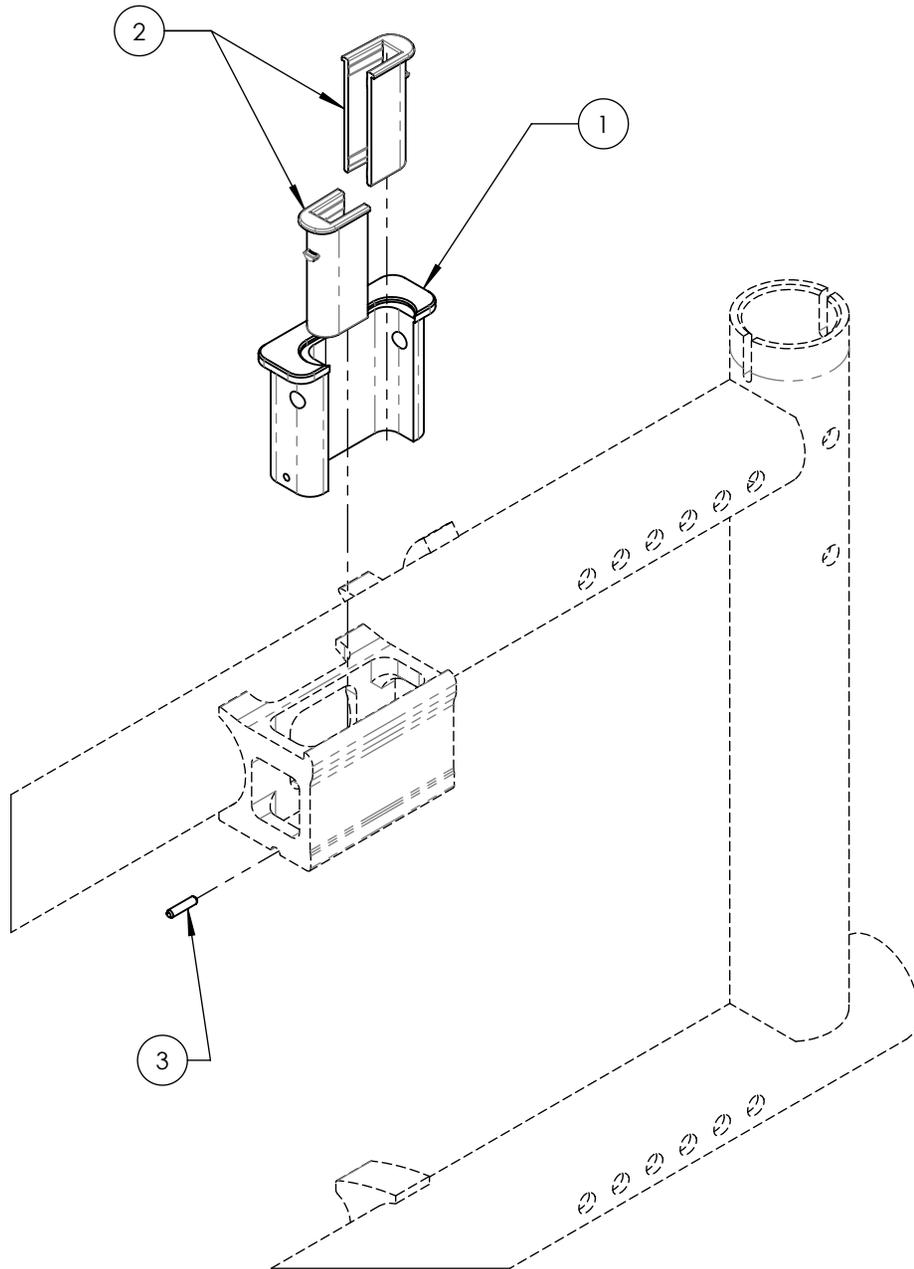


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001319A\_9001321A**  
**GARDE-BOUE - FIBRE DE CARBONE, DROIT**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                     | 9001319 | 9001320 | 9001321 |
|----------|-------------|---|---------|---------|---------|
| 1        | 0051106A-00 | GARDE BOUE CARBONE PETIT, DROITE                | 1       | -       | -       |
| 2        | 0051108A-00 | GARDE BOUE CARBONE MOYEN, DROITE                | -       | 1       | -       |
| 3        | 0051110A-00 | GARDE BOUE CARBONE GRAND, DROITE                | -       | -       | 1       |
| 4        | 0090631A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M4x0.7x8mm L                    | 4       | 4       | 4       |
| 5        | 0051118A-00 | PLAQUE AJUSTEMENT GARDE BOUE & PROTÈGE VÊTEMENT | 1       | 1       | 1       |

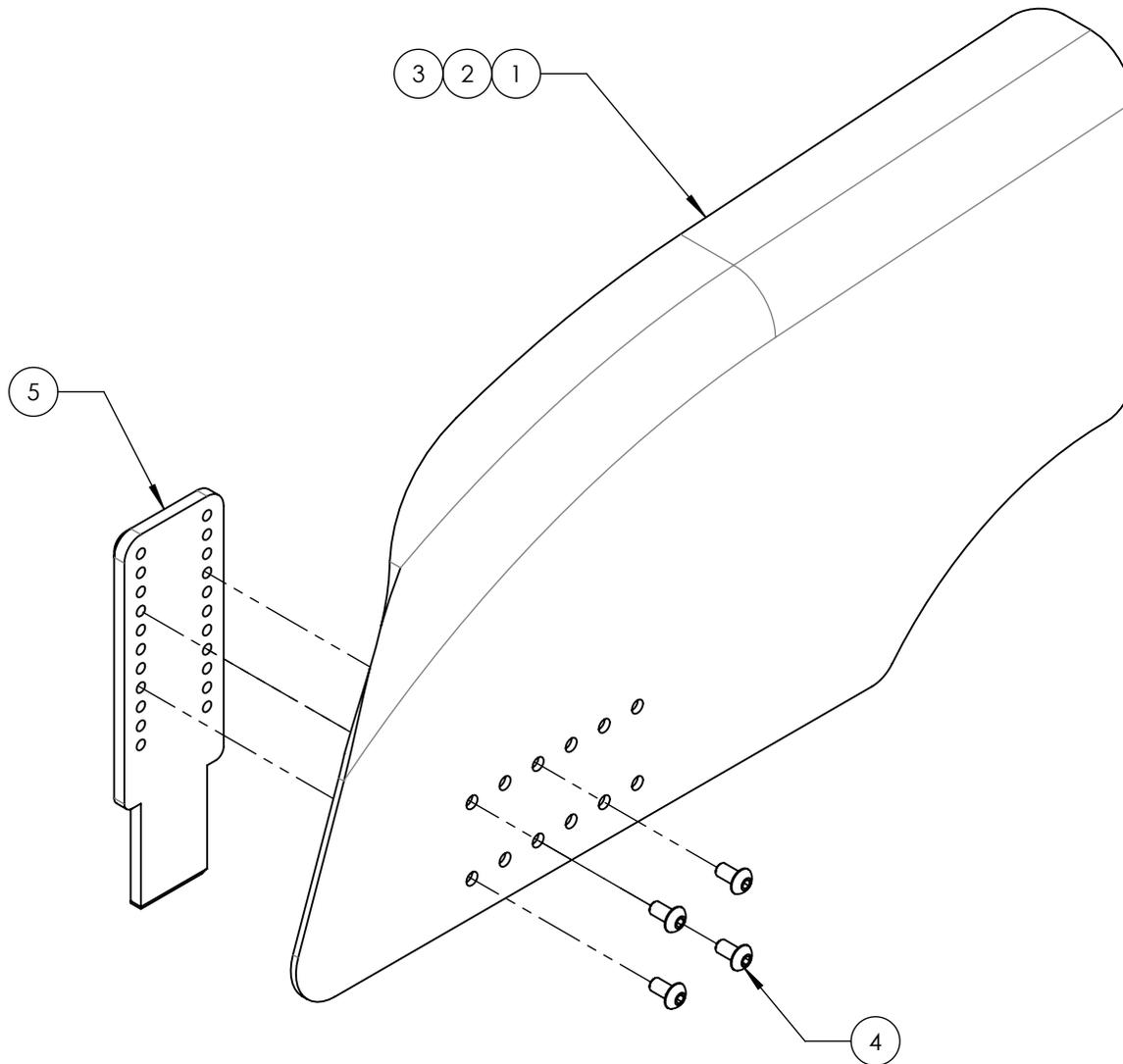


9001319A-00  
 GARDE-BOUE - CARBONE, DROITE,  
 PETIT

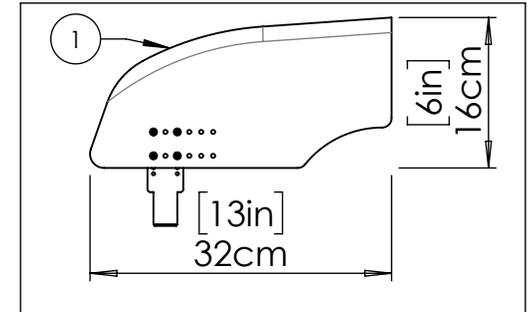

9001320A-00  
 GARDE-BOUE - CARBONE, DROITE,  
 MOYEN

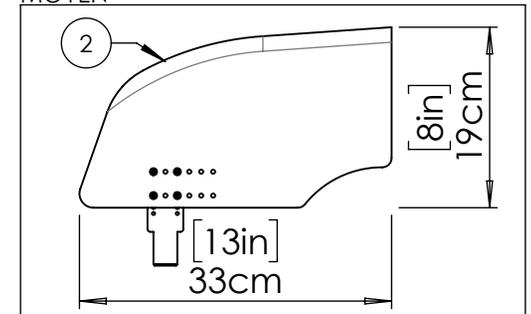


9001321A-00  
 GARDE-BOUE - CARBONE, DROITE, GRAND

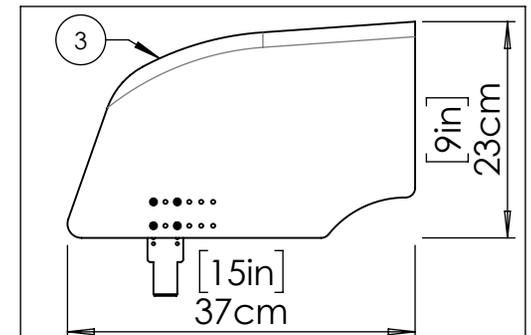


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001322A\_9001324A**  
**GARDE-BOUE - FIBRE DE CARBONE, GAUCHE**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                     | 9001322 | 9001323 | 9001324 |
|----------|-------------|---|---------|---------|---------|
| 1        | 0051107A-00 | GARDE BOUE CARBONE PETIT, GAUCHE                | 1       | -       | -       |
| 2        | 0051109A-00 | GARDE BOUE CARBONE MOYEN, GAUCHE                | -       | 1       | -       |
| 3        | 0051111A-00 | GARDE BOUE CARBONE GRAND, GAUCHE                | -       | -       | 1       |
| 4        | 0051118A-00 | PLAQUE AJUSTEMENT GARDE BOUE & PROTÈGE VÊTEMENT | 1       | 1       | 1       |
| 5        | 0090631A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M4x0.7x8mm L                    | 4       | 4       | 4       |

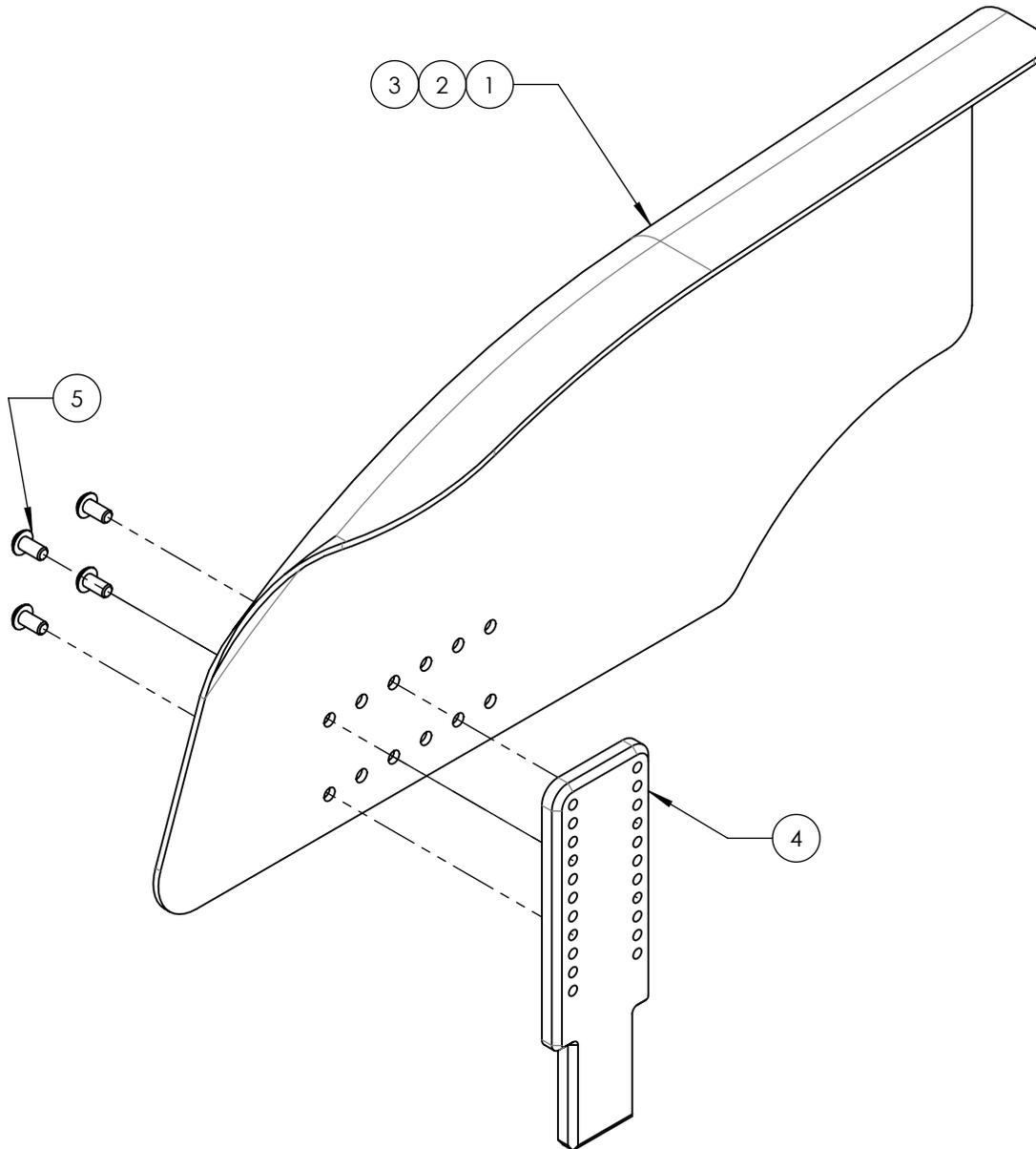


9001322A-00  
 FENDER SIDE GUARD - CARBON, LEFT, SMALL

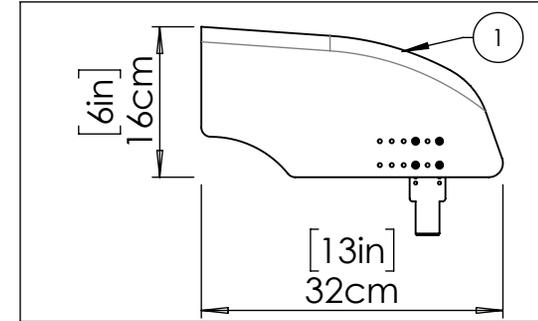

9001323A-00  
 FENDER SIDE GUARD - CARBON, LEFT, MEDIUM

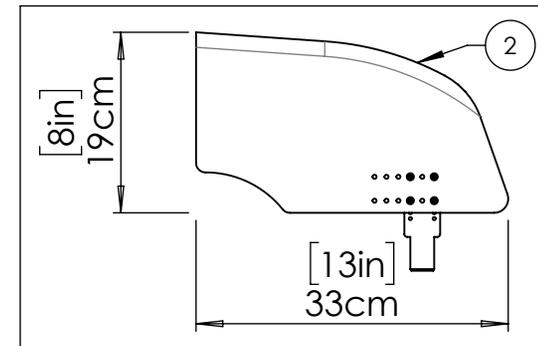

9001324A-00  
 FENDER SIDE GUARD - CARBON, LEFT, LARGE

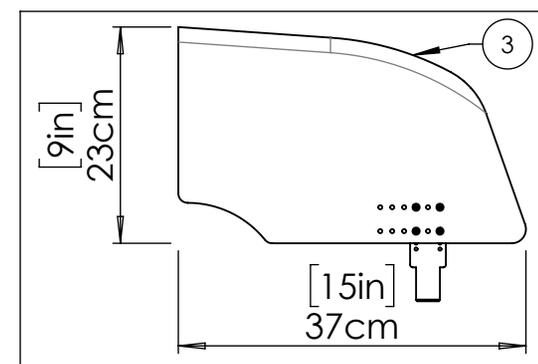


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


**9002489A 9002491A**  
**PROTÈGE-VÊTEMENTS - FIBRE DE CARBONE, AMOVIBLE, DROIT**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                     | 9002489 | 9002490 | 9002491 |
|----------|-------------|---|---------|---------|---------|
| 1        | 0051213B-00 | PROTÈGE-VÊTEMENT CARBONE AJUST PETIT - ASSY     | 1       | -       | -       |
| 2        | 0051214B-00 | PROTÈGE-VÊTEMENT CARBONE AJUST MOYEN - ASSY     | -       | 1       | -       |
| 3        | 0051215B-00 | PROTÈGE-VÊTEMENT CARBONE AJUST GRAND - ASSY     | -       | -       | 1       |
| 4        | 0051118A-00 | PLAQUE AJUSTEMENT GARDE BOUE & PROTÈGE VÊTEMENT | 1       | 1       | 1       |
| 5        | 0090631A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M4x0.7x8mm L                    | 4       | 4       | 4       |



9002489A-00  
 PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, DROITE, PETIT

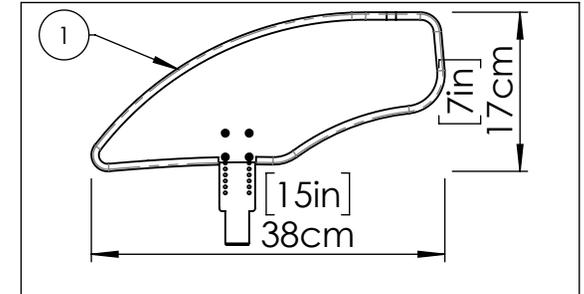

9002490A-00  
 PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, DROITE, MOYEN

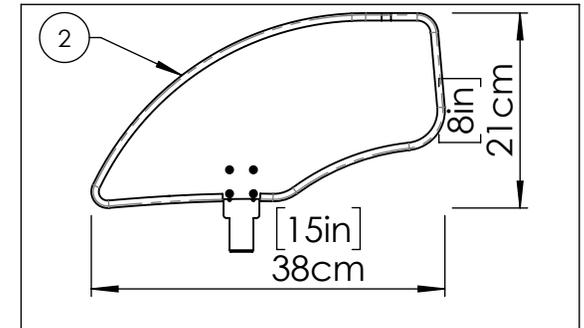


9002491A-00  
 PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, DROITE, GRAND

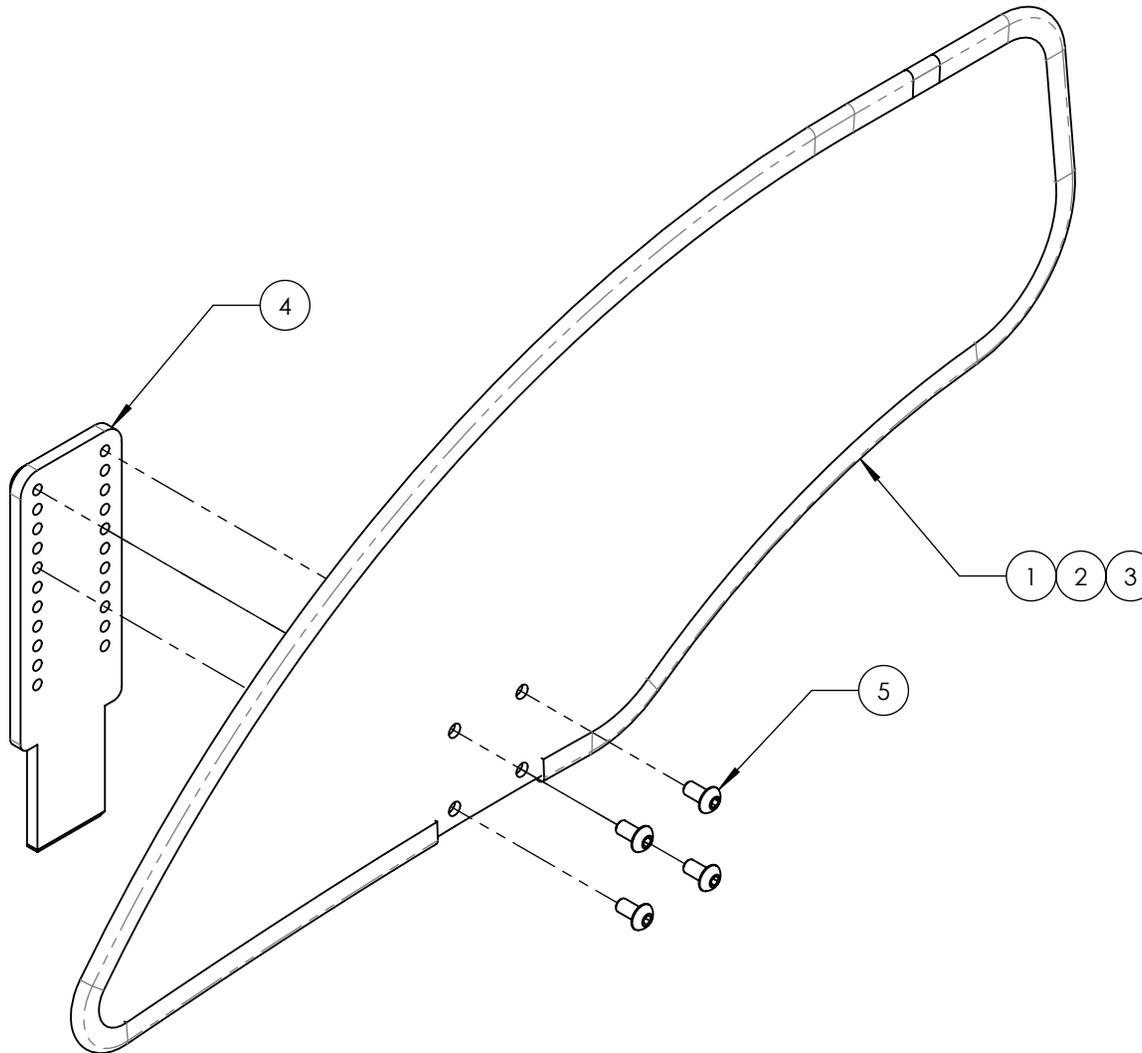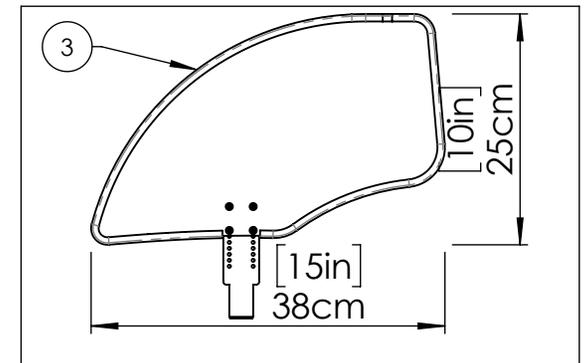


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9002492A\_9002494A**  
**PROTÈGE-VÊTEMENTS - FIBRE DE CARBONE, AMOVIBLE, GAUCHE**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                     | 9002492 | 9002493 | 9002494 |
|----------|-------------|---|---------|---------|---------|
| 1        | 00512138-00 | PROTÈGE-VÊTEMENT CARBONE AJUST PETIT - ASSY     | 1       | -       | -       |
| 2        | 00512148-00 | PROTÈGE-VÊTEMENT CARBONE AJUST MOYEN - ASSY     | -       | 1       | -       |
| 3        | 00512158-00 | PROTÈGE-VÊTEMENT CARBONE AJUST GRAND - ASSY     | -       | -       | 1       |
| 4        | 0051118A-00 | PLAQUE AJUSTEMENT GARDE BOUE & PROTÈGE VÊTEMENT | 1       | 1       | 1       |
| 5        | 0090631A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M4x0.7x8mm L                    | 4       | 4       | 4       |

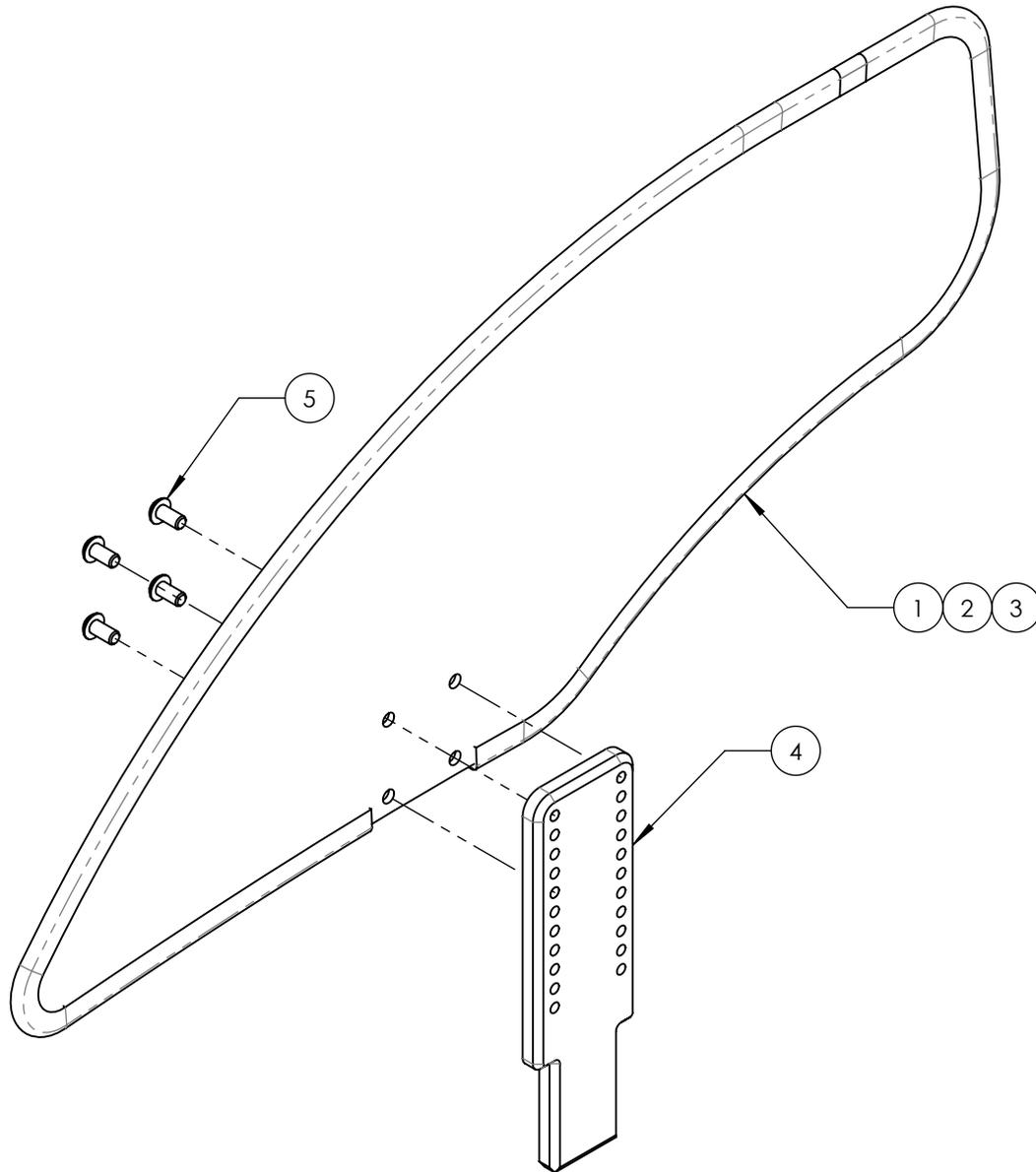


9002492A-00  
 PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, GAUCHE, PETIT

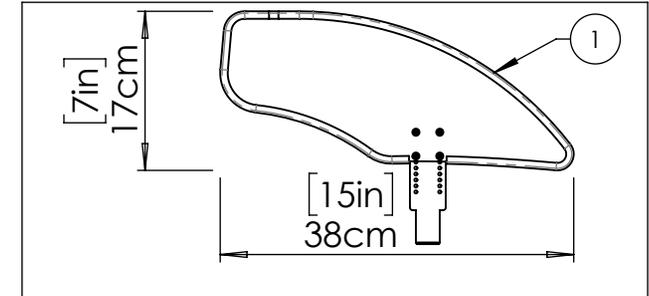

9002493A-00  
 PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, GAUCHE, MOYEN

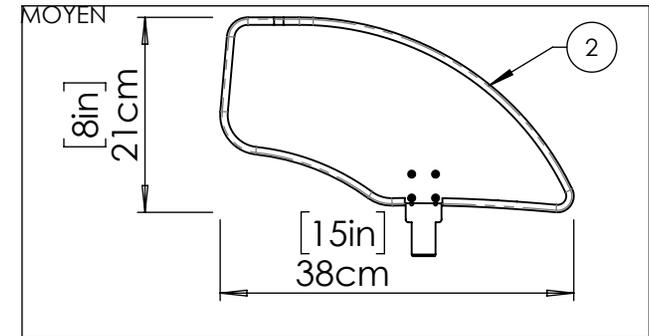


9002494A-00  
 PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, GAUCHE, GRAND

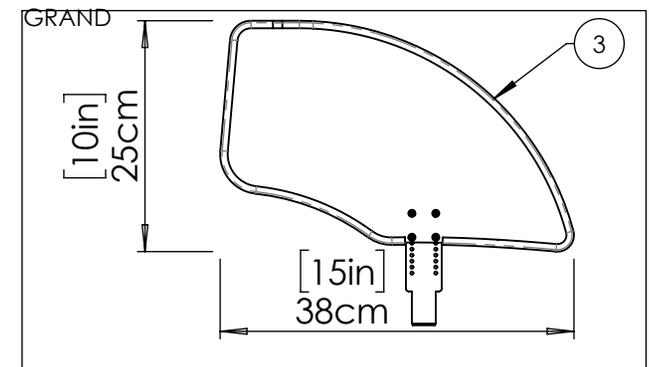


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9007630A 9007633A**  
**GARDE-BOUE - PLASTIQUE, DROIT**

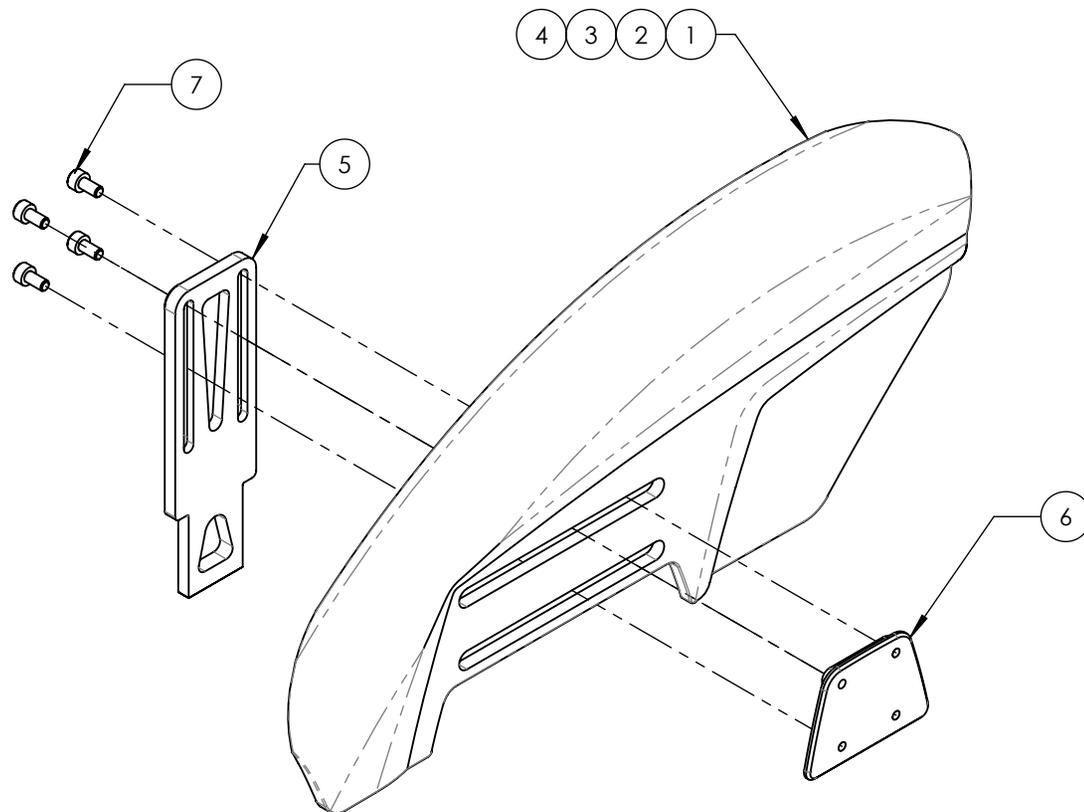


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                          | 9007630 | 9007631 | 9007632 | 9007633 |
|----------|-------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1        | 0051385A-00 | GARDE-BOUE PLASTIQUE X-PETIT, DROITE | 1       | -       | -       | -       |
| 2        | 0051386A-00 | GARDE-BOUE PLASTIQUE PETIT, DROITE   | -       | 1       | -       | -       |
| 3        | 0051387A-00 | GARDE-BOUE PLASTIQUE MOYEN, DROITE   | -       | -       | 1       | -       |
| 4        | 0051388A-00 | GARDE-BOUE PLASTIQUE GRAND, DROITE   | -       | -       | -       | 1       |
| 5        | 0051393A-00 | PLAQUE AJUSTABLE GARDE-BOUE          | 1       | 1       | 1       | 1       |
| 6        | 0051395A-00 | PLAQUE INT. GARDE-BOUE               | 1       | 1       | 1       | 1       |
| 7        | 0090723A-00 | VIS TÊTE CYLIND M4x0.7x8mm L         | 4       | 4       | 4       | 4       |


9007630A-00  
 GARDE-BOUE - PLASTIQUE, DROITE, X-PETIT

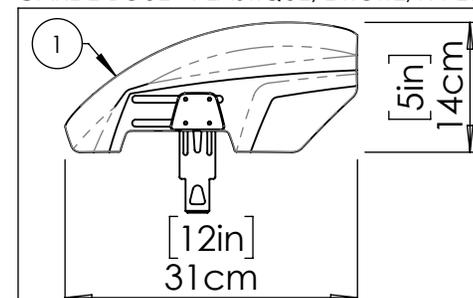


9007631A-00  
 GARDE-BOUE - PLASTIQUE, DROITE, PETIT

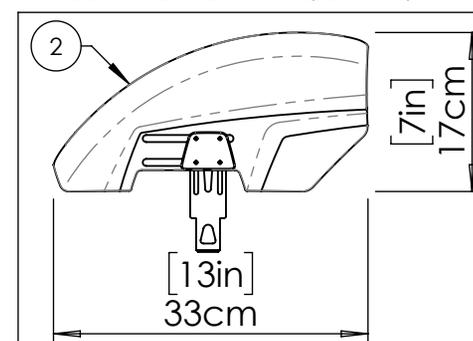

9007633A-00  
 GARDE-BOUE - PLASTIQUE, DROITE, GRAND

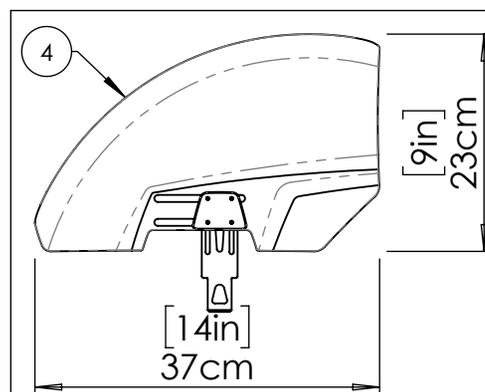


9007632A-00  
 GARDE-BOUE - PLASTIQUE, DROITE, MOYEN

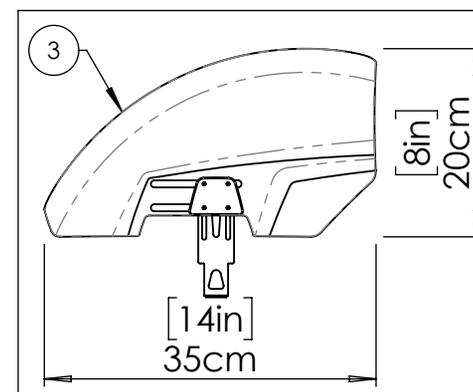


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9007634A 9007637A**  
**GARDE-BOUE - PLASTIQUE, GAUCHE**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                          | 9007634 | 9007635 | 9007636 | 9007637 |
|----------|-------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1        | 0051389A-00 | GARDE-BOUE PLASTIQUE X-PETIT, GAUCHE | 1       | -       | -       | -       |
| 2        | 0051390A-00 | GARDE-BOUE PLASTIQUE PETIT, GAUCHE   | -       | 1       | -       | -       |
| 3        | 0051391A-00 | GARDE-BOUE PLASTIQUE MOYEN, GAUCHE   | -       | -       | 1       | -       |
| 4        | 0051392A-00 | GARDE-BOUE PLASTIQUE GRAND, GAUCHE   | -       | -       | -       | 1       |
| 5        | 0051393A-00 | PLAQUE AJUSTABLE GARDE-BOUE          | 1       | 1       | 1       | 1       |
| 6        | 0051395A-00 | PLAQUE INT. GARDE-BOUE               | 1       | 1       | 1       | 1       |
| 7        | 0090724A-00 | VIS TÊTE CYLIND M4x0.7x10mm L        | 4       | 4       | 4       | 4       |

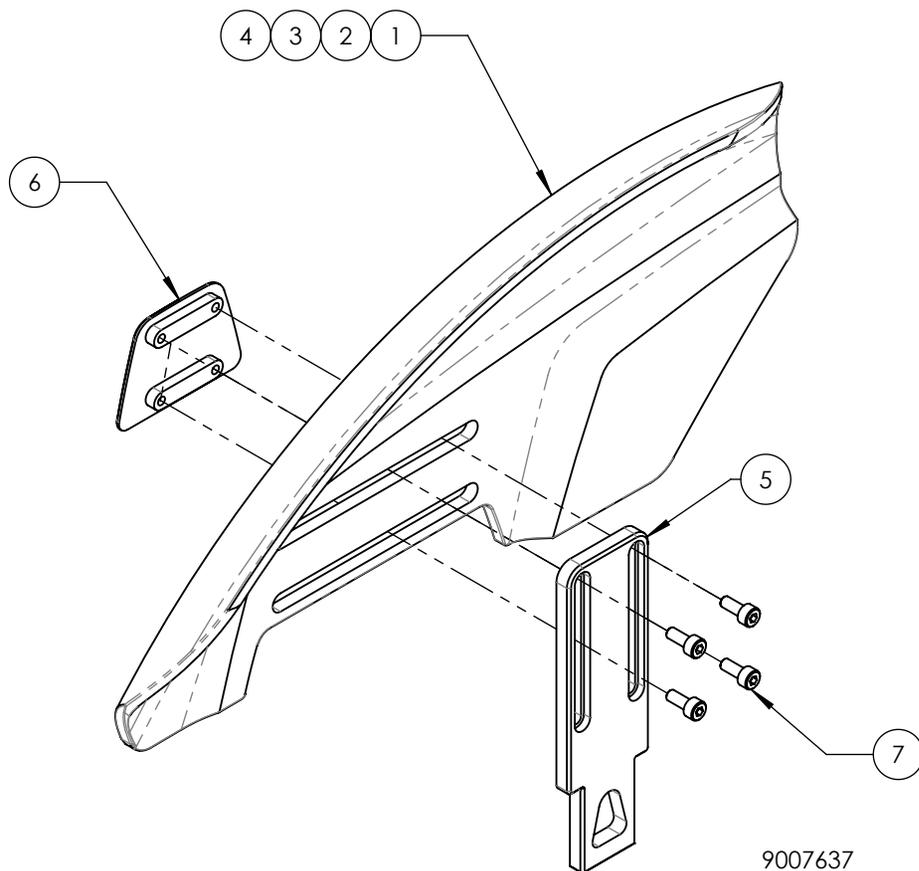


9007634  
 GARDE-BOUE - PLASTIQUE, GAUCHE, X-PETIT

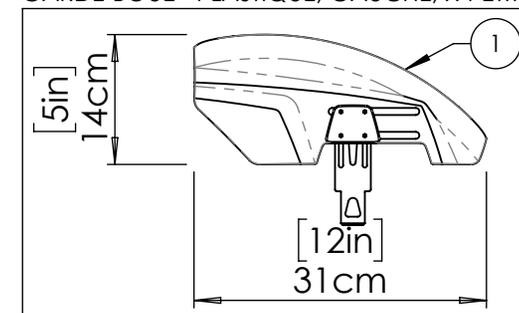


9007635  
 GARDE-BOUE - PLASTIQUE, GAUCHE, PETIT

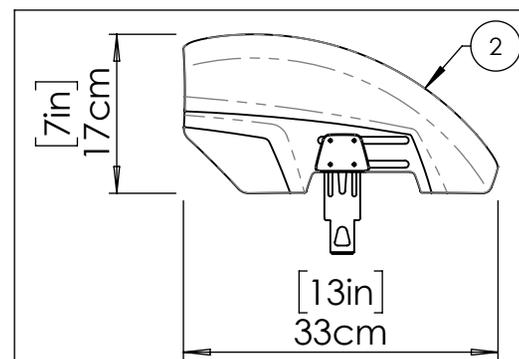

9007637  
 GARDE-BOUE - PLASTIQUE, GAUCHE, GRAND

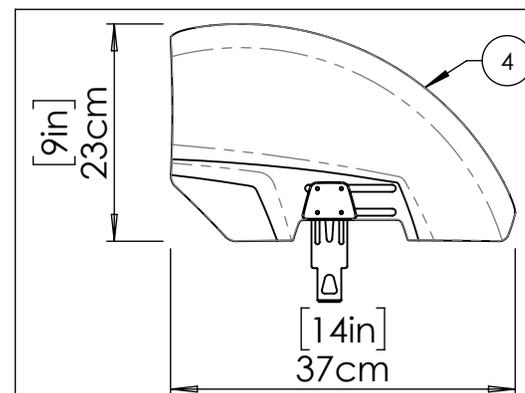


9007636  
 GARDE-BOUE - PLASTIQUE, GAUCHE, MOYEN

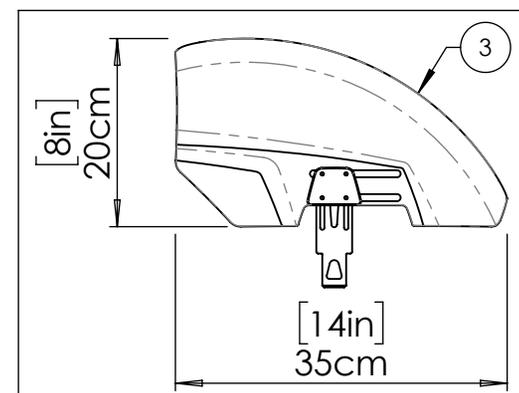

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue de protège-vêtements**  
**Garde-boues**



| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                             | QTÉ |
|----------|-------------|---|-----|
| 1        | 9007630A-00 | GARDE-BOUE - PLASTIQUE, DROITE, X-PETIT | 1   |
| 2        | 9007634A-00 | GARDE-BOUE - PLASTIQUE, GAUCHE, X-PETIT | 1   |
| 3        | 9007631A-00 | GARDE-BOUE - PLASTIQUE, DROITE, PETIT   | 1   |
| 4        | 9007635A-00 | GARDE-BOUE - PLASTIQUE, GAUCHE, PETIT   | 1   |
| 5        | 9007632A-00 | GARDE-BOUE - PLASTIQUE, DROITE, MOYEN   | 1   |
| 6        | 9007636A-00 | GARDE-BOUE - PLASTIQUE, GAUCHE, MOYEN   | 1   |
| 7        | 9007633A-00 | GARDE-BOUE - PLASTIQUE, DROITE, GRAND   | 1   |
| 8        | 9007637A-00 | GARDE-BOUE - PLASTIQUE, GAUCHE, GRAND   | 1   |
| 9        | 9001319A-00 | GARDE-BOUE - CARBONE, DROITE, PETIT     | 1   |
| 10       | 9001322A-00 | GARDE-BOUE - CARBONE, GAUCHE, PETIT     | 1   |
| 11       | 9001320A-00 | GARDE-BOUE - CARBONE, DROITE, MOYEN     | 1   |
| 12       | 9001323A-00 | GARDE-BOUE - CARBONE, GAUCHE, MOYEN     | 1   |
| 13       | 9001321A-00 | GARDE-BOUE - CARBONE, DROITE, GRAND     | 1   |
| 14       | 9001324A-00 | GARDE-BOUE - CARBONE, GAUCHE, GRAND     | 1   |

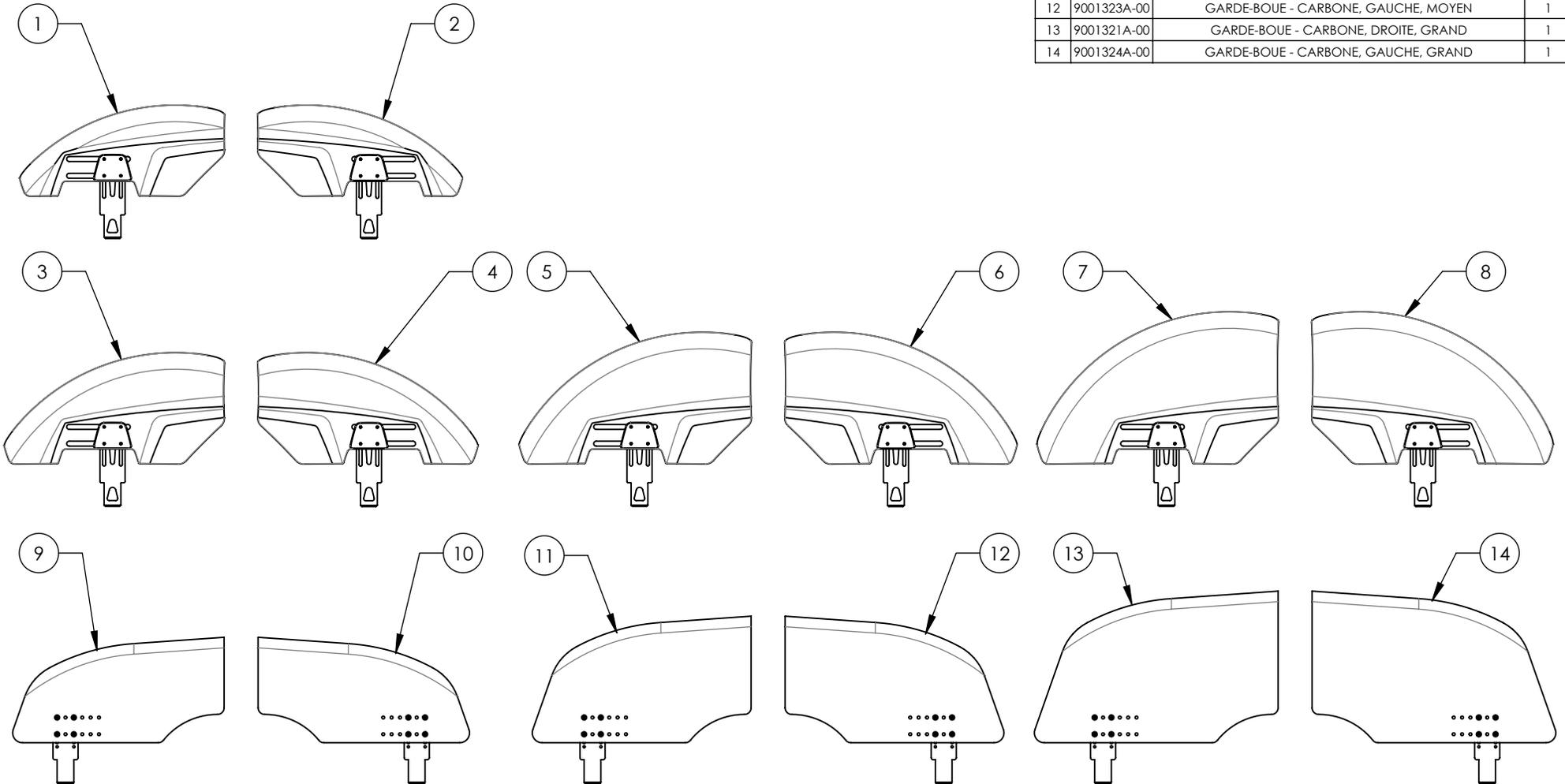

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue de protège-vêtements**  
**Insert pour réceptacle V2**

| No ITEM | No PIECE    | DESCRIPTION                     | QTÉ |
|---------|-------------|---------------------------------|-----|
| 1       | 9001307A-00 | INSERT - ADAPTEUR RÉCEPTACLE V2 | 2   |


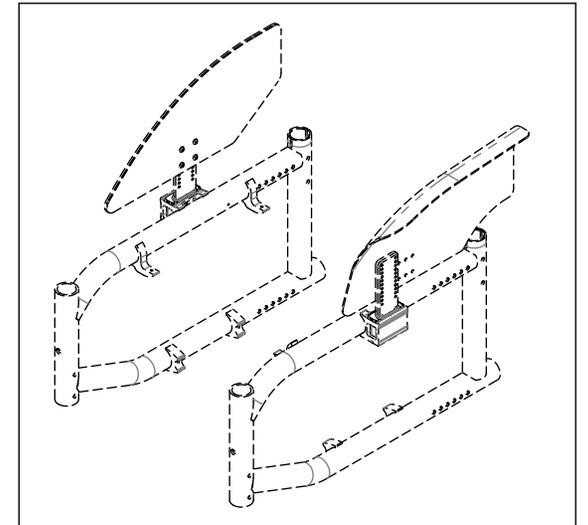
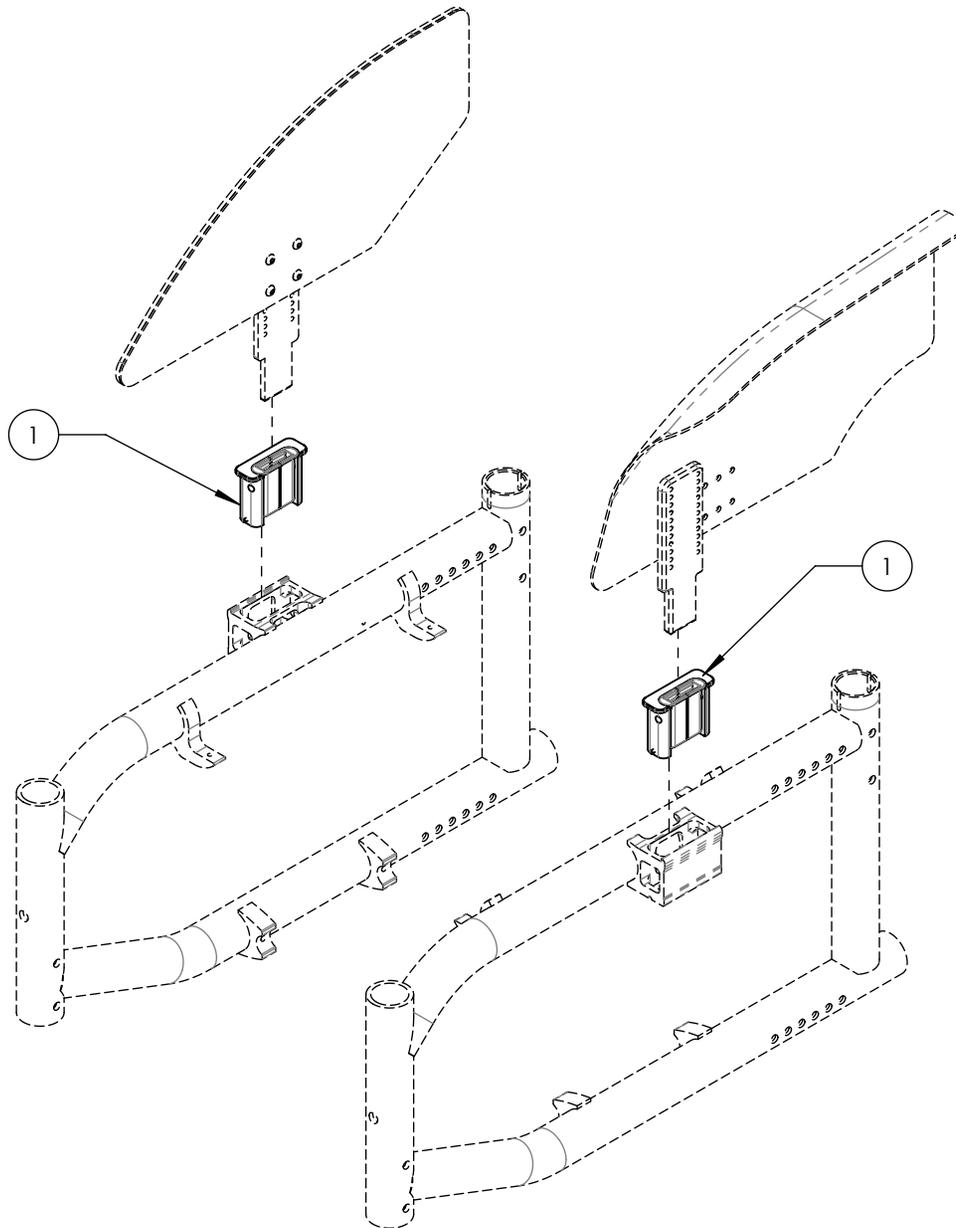


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue de protège-vêtements**  
**Brides pour protège-vêtements et garde-boue**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                  | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 1        | 0002174B-00 | LANGUETTE PROTÈGE-VÊTEMENTS - ASSY           | 2   |
| 2        | 0003790A-00 | BRIDE PROTÈGE-VÊTEMENTS DÉPORTÉE ARR. - ASSY | 2   |


| OPTIONS                     | BRIDE À UTILISER |
|-----------------------------|------------------|
| PROTÈGE-VÊTEMENTS PLASTIQUE | 0002174B-00      |
| PROTÈGE-VÊTEMENTS CARBONE   | 0003790A-00      |
| GARDE-BOUE PLASTIQUE        | 0002174B-00      |
| GARDE-BOUE CARBONE          | 0003790A-00      |

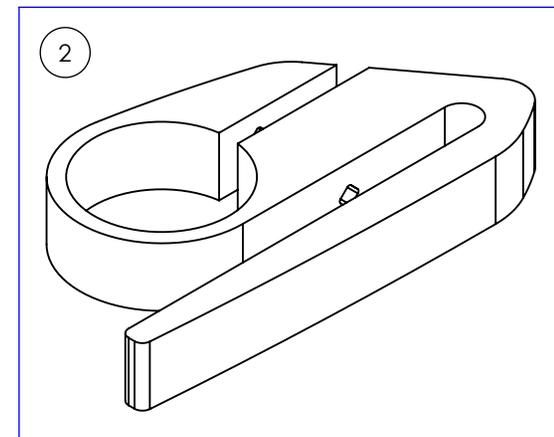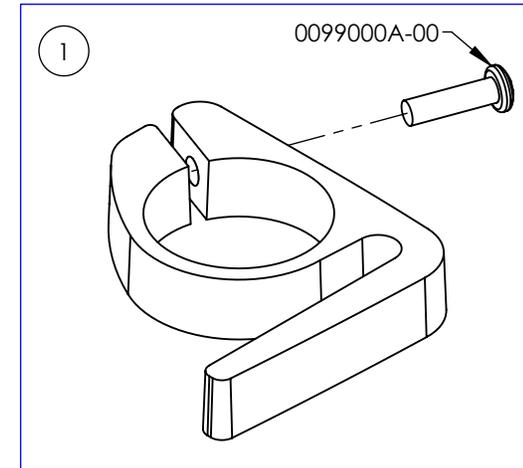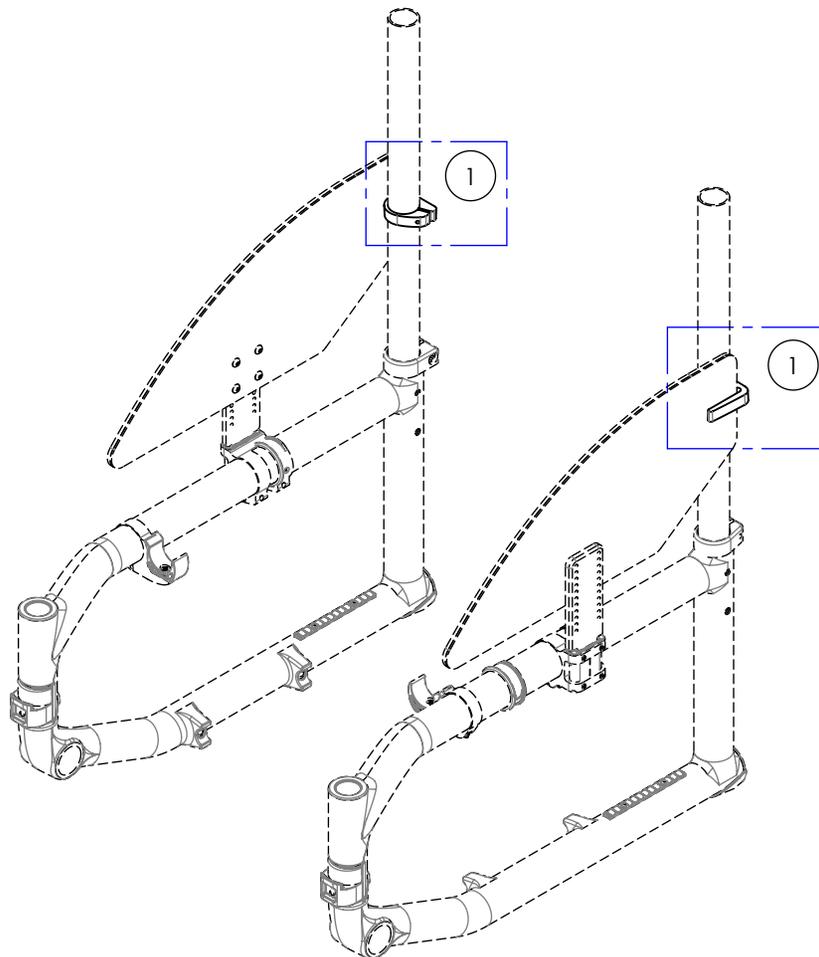

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue de protège-vêtements**  
**Protège-vêtements souple**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION             | QTÉ |
|----------|-------------|-------------------------|-----|
| 1        | 0051004A-00 | PROTEGE VETEMENT SOUPLE | 1   |

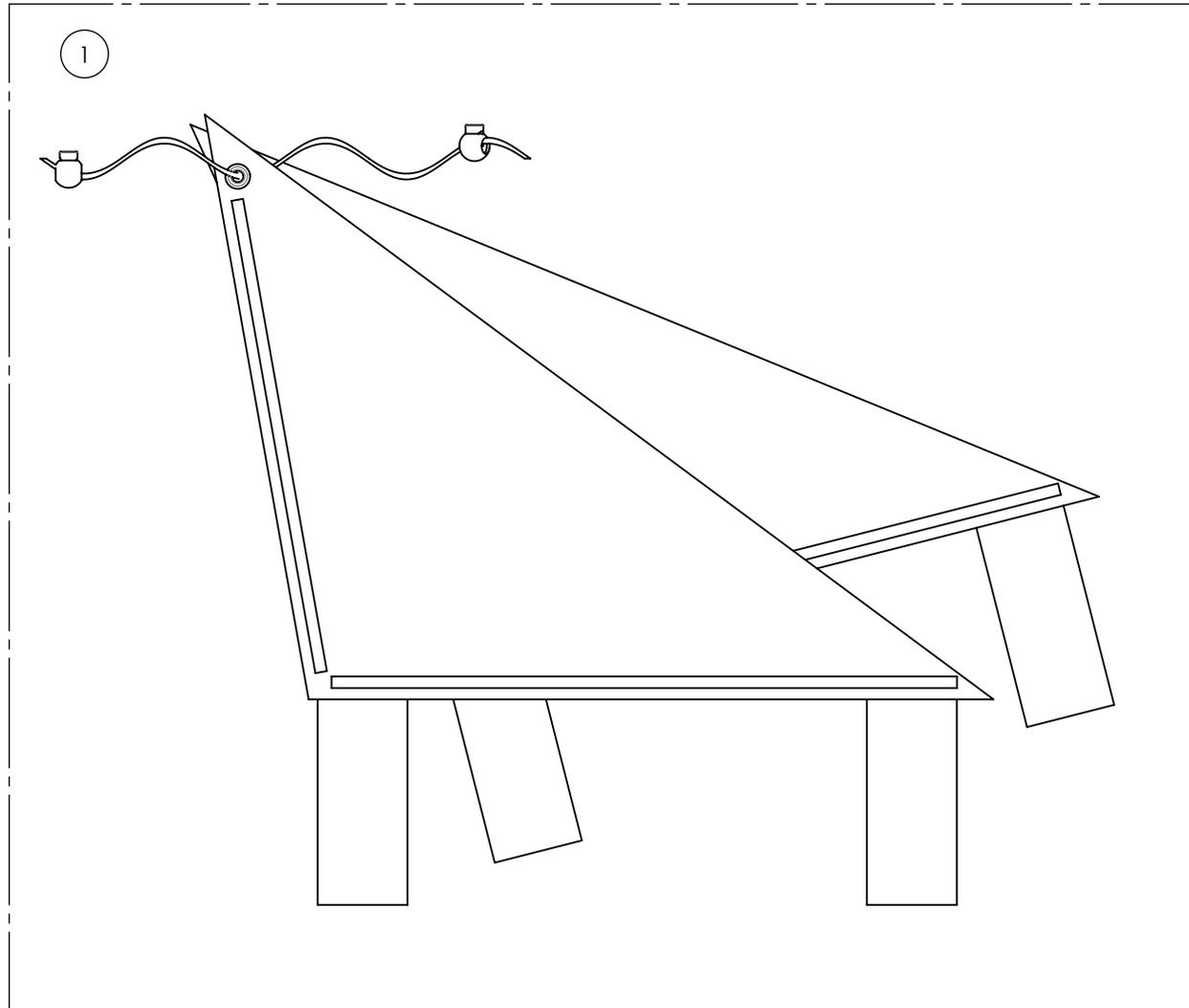

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue de protège-vêtements**  
**Protège-vêtements**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                     | QTÉ |
|----------|-------------|---|-----|
| 1        | 9001295A-00 | PROTÈGE-VÊTEMENT - PLASTIQUE, DROITE, PETIT     | 1   |
| 2        | 9001297A-00 | PROTÈGE-VÊTEMENT - PLASTIQUE, GAUCHE, PETIT     | 1   |
| 3        | 9001296A-00 | PROTÈGE-VÊTEMENT - PLASTIQUE, DROITE, MOYEN     | 1   |
| 4        | 9001298A-00 | PROTÈGE-VÊTEMENT - PLASTIQUE, GAUCHE, MOYEN     | 1   |
| 5        | 9002489A-00 | PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, DROITE, PETIT       | 1   |
| 6        | 9002492A-00 | PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, GAUCHE, PETIT       | 1   |
| 7        | 9002490A-00 | PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, DROITE, MOYEN       | 1   |
| 8        | 9002493A-00 | PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, GAUCHE, MOYEN       | 1   |
| 9        | 9002491A-00 | PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, DROITE, GRAND       | 1   |
| 10       | 9002494A-00 | PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, GAUCHE, GRAND       | 1   |
| 11*      | 9001289A-00 | PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, FIXE, DROITE, PETIT | 1   |
| 12*      | 9001292A-00 | PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, FIXE, GAUCHE, PETIT | 1   |
| 13*      | 9001290A-00 | PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, FIXE, DROITE, MOYEN | 1   |
| 14*      | 9001293A-00 | PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, FIXE, GAUCHE, MOYEN | 1   |
| 15*      | 9001291A-00 | PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, FIXE, DROITE, GRAND | 1   |
| 16*      | 9001294A-00 | PROTÈGE-VÊTEMENT - CARBONE, FIXE, GAUCHE, GRAND | 1   |

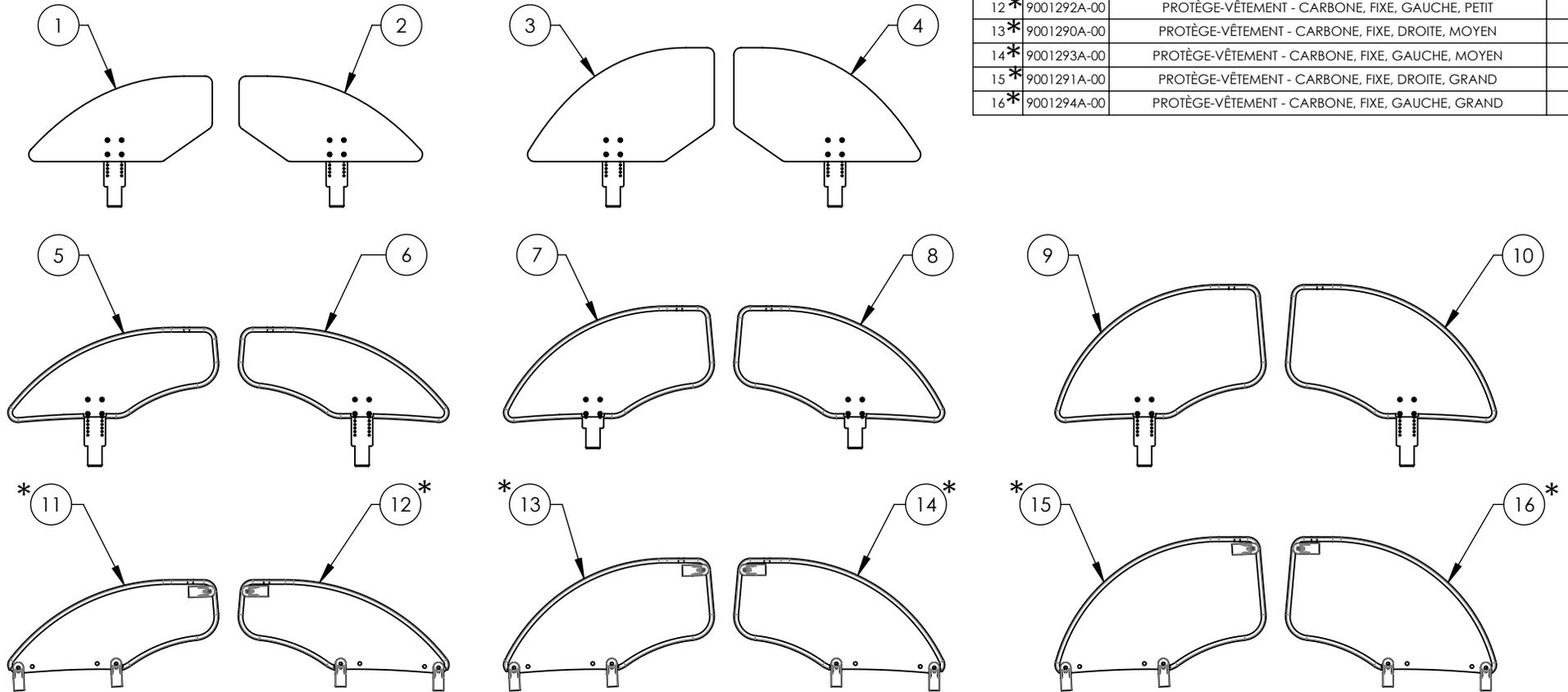


\*:NON DISPONIBLE POUR LES FAUTEUILS HELIO K ET APEX

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


**9001587B\_9001588B**  
**CEINTURE DE POSITIONNEMENT 35 po**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                    | 9001588 | 9001587 |
|----------|-------------|--------------------------------|---------|---------|
| 1        | 0051027B-00 | CEINTURE BOUCLE AUTO 35po      | 1       | -       |
| 2        | 0051589A-00 | CEINTURE VELCRO 35po - ASSY    | -       | 1       |
| 3        | 0060500A-00 | FRAME SAVER (SAC DE 2 / 60201) | 1       | 1       |

9001587B-00  
 CEINTURE - TYPE VELCRO, 35po

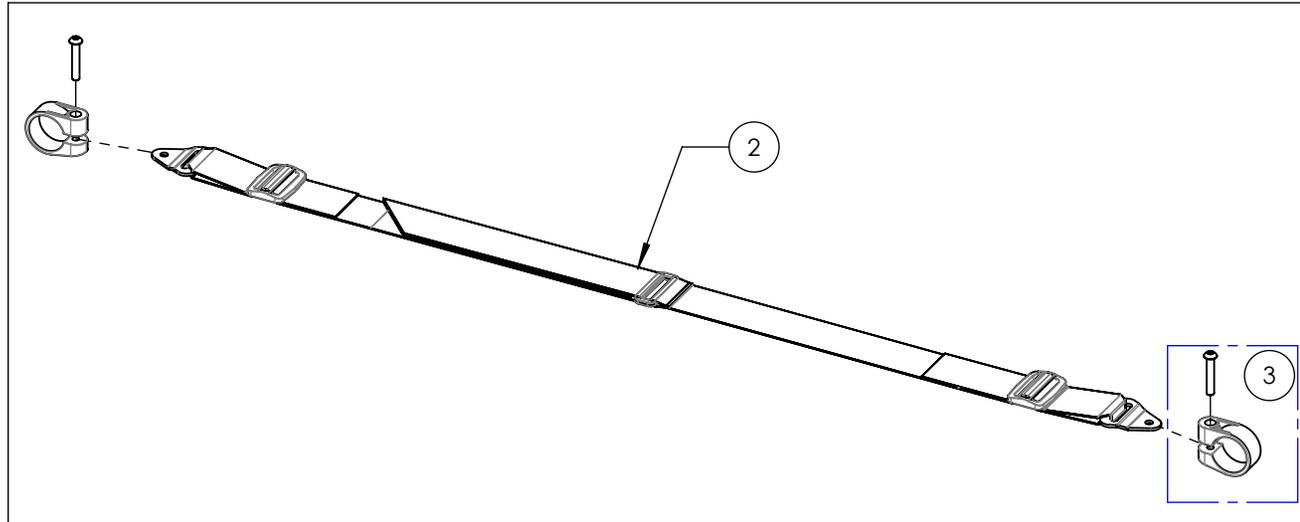

9001588B-00  
 CEINTURE - TYPE VELCRO, 35po

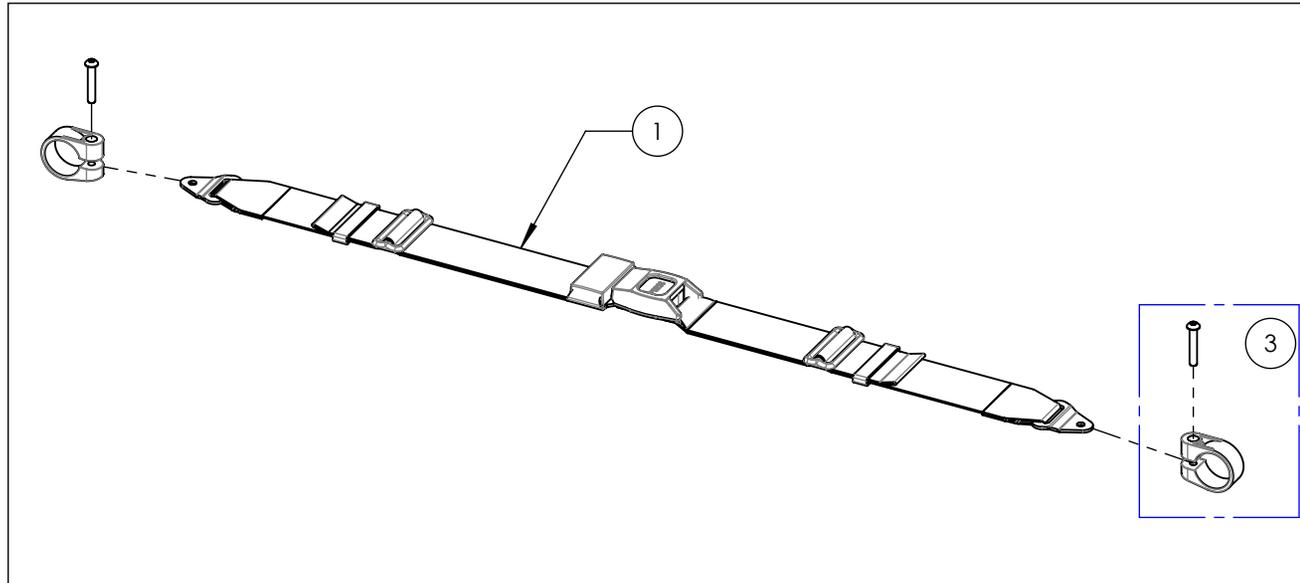


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


**9002138B\_9002139B**  
**CEINTURE DE POSITIONNEMENT 60 PO**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                    | 9002138 | 9002139 |
|----------|-------------|--------------------------------|---------|---------|
| 1        | 0051584A-00 | CEINTURE VELCRO 60po - ASSY    | 1       | -       |
| 2        | 0051583B-00 | CEINTURE BOUCLE AUTO 60po      | -       | 1       |
| 3        | 0060500A-00 | FRAME SAVER (SAC DE 2 / 60201) | 1       | 1       |

9002138B-00  
 SEATBELT - VELCRO ADJ, 60in

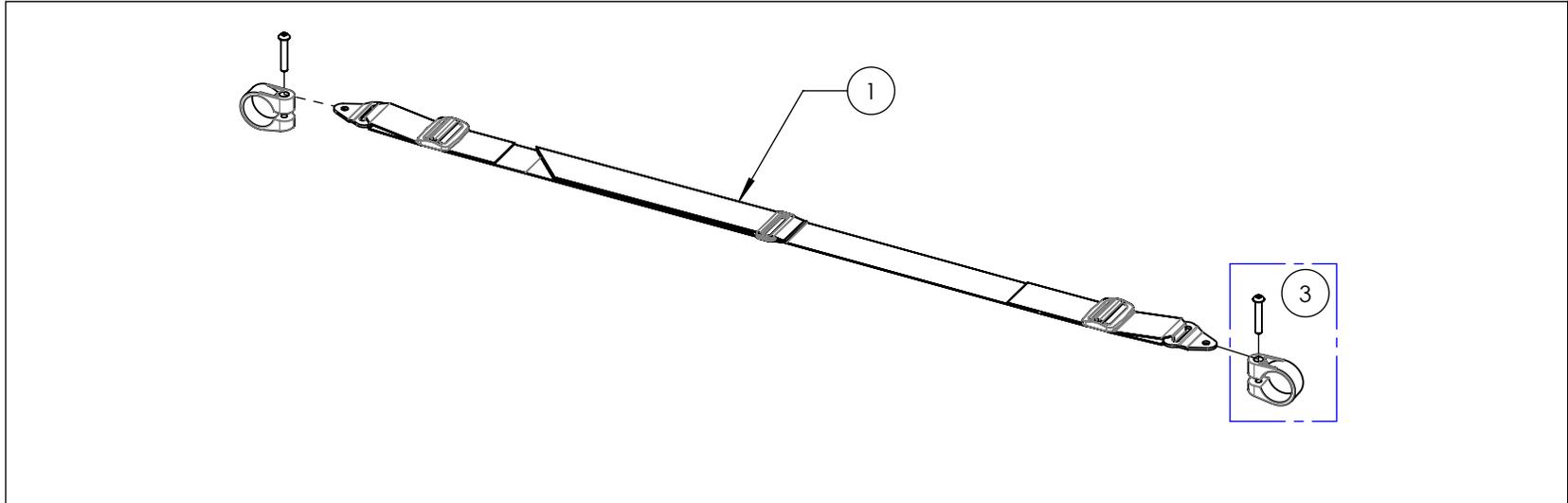


9002139B-00  
 CEINTURE - TYPE AUTO, 60po

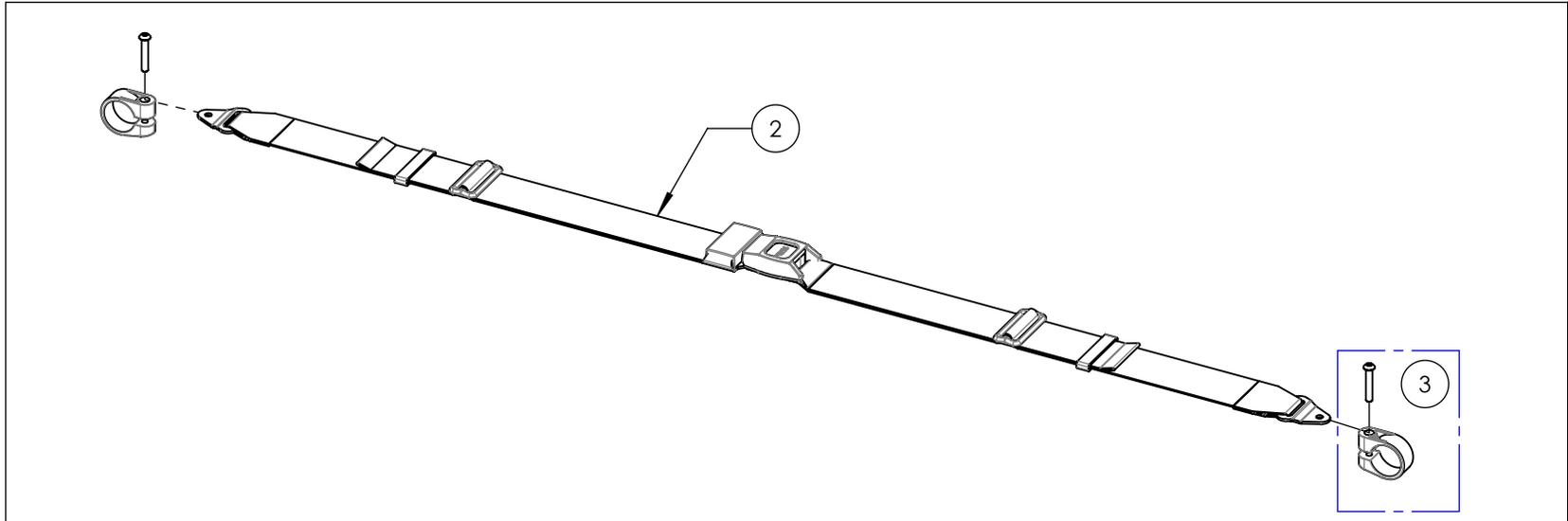

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9002220A-00**  
**Quincaillerie - Bagues supplémentaires (2)**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                    | QTÉ |
|----------|-------------|--------------------------------|-----|
| 1        | 0060500A-00 | FRAME SAVER (SAC DE 2 / 60201) | 1   |

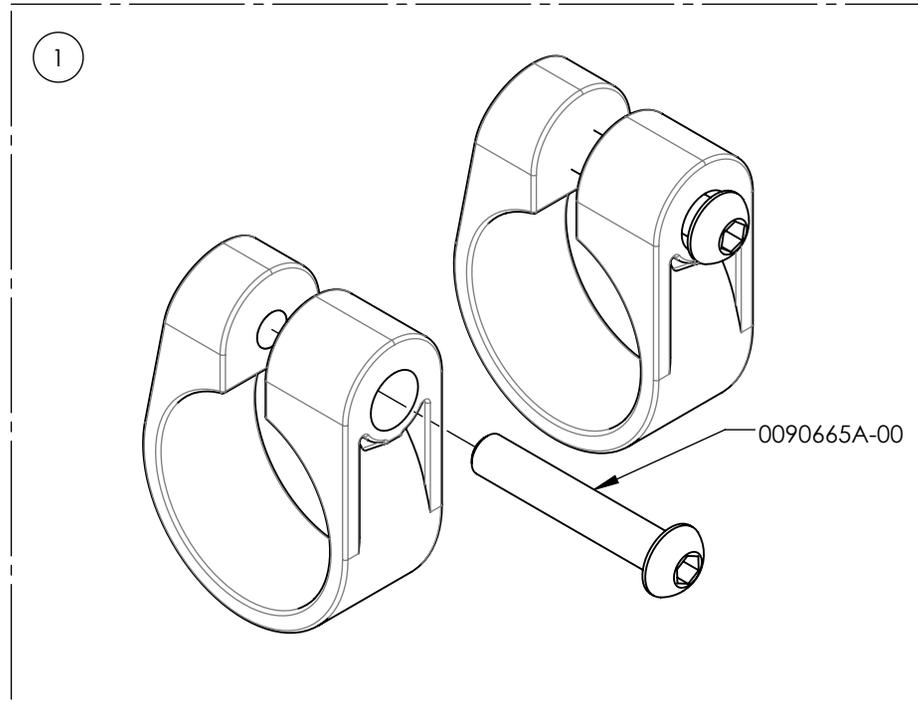

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9002221A 9002228A  
CEINTURES BODYPOINT**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                  | 9002221 | 9002222 | 9002223 | 9002224 | 9002225 | 9002226 | 9002227 | 9002228 | REPLACEMENT PIÈCES |
|----------|-------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
| 1        | 0051131A-00 | CEINTURE BODYPOINT 2 PTS NON REMBOURÉE MOYEN | 1       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                  |
| 1        | 0051211A-00 | CEINTURE BODYPOINT 2 PTS NON REMBOURÉE LARGE | -       | 1       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                  |
| 1        | 0051132A-00 | CEINTURE BODYPOINT 2 PTS REMBOURÉE PETIT     | -       | -       | 1       | -       | -       | -       | -       | -       | -                  |
| 1        | 0051133A-00 | CEINTURE BODYPOINT 2 PTS REMBOURÉE MOYEN     | -       | -       | -       | 1       | -       | -       | -       | -       | -                  |
| 1        | 0051134A-00 | CEINTURE BODYPOINT 2 PTS REMBOURÉE GRAND     | -       | -       | -       | -       | 1       | -       | -       | -       | -                  |
| 1        | 0051212A-00 | CEINTURE BODYPOINT 4 PTS REMBOURÉE PETIT     | -       | -       | -       | -       | -       | 1       | -       | -       | -                  |
| 1        | 0051135A-00 | CEINTURE BODYPOINT 4 PTS REMBOURÉE MOYEN     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1       | -       | -                  |
| 1        | 0051136A-00 | CEINTURE BODYPOINT 4 PTS REMBOURÉE GRAND     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1       | -                  |
| 2        | 0060500A-00 | FRAME SAVER (SAC DE 2 / 60201)               | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 2       | 2       | 2       | 1                  |

9002221 A 9002222

CEINTURE - BODYPOINT, NON-REMBOURÉE 2 PTS, MOYEN  
CEINTURE - BODYPOINT, NON-REMBOURÉE 2 PTS, LARGE



9002223 A 9002225

CEINTURE - BODYPOINT, REMBOURÉE 2 PTS, PETIT  
CEINTURE - BODYPOINT, REMBOURÉE 2 PTS, MOYEN  
CEINTURE - BODYPOINT, REMBOURÉE 2 PTS, LARGE




9002226 A 9002228

CEINTURE - BODYPOINT, REMBOURÉE 4 PTS, PETIT  
CEINTURE - BODYPOINT, REMBOURÉE 4 PTS, MOYEN  
CEINTURE - BODYPOINT, REMBOURÉE 4 PTS, LARGE



+

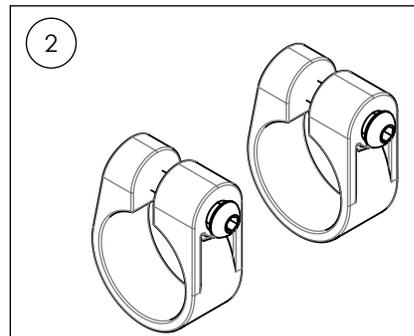

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9007790A 9007793A  
CEINTURE BODYPOINT, EVOFLEX**




| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                 | 9007790A | 9007791A | 9007792A | 9007793A |
|----------|-------------|---|----------|----------|----------|----------|
| 1        | 0051417A-00 | CEINTURE BODYPOINT EVOFLEX BOUCLE REHAB M46 | 1        | -        | -        | -        |
| 2        | 0051418A-00 | CEINTURE BODYPOINT EVOFLEX BOUCLE REHAB L62 | -        | 1        | -        | -        |
| 3        | 0051415A-00 | CEINTURE BODYPOINT EVOFLEX PIVOTANTE S38    | -        | -        | 1        | -        |
| 4        | 0051416A-00 | CEINTURE BODYPOINT EVOFLEX PIVOTANTE M46    | -        | -        | -        | 1        |
| 5        | 0051419A-00 | ATTACHE BODYPOINT BAND CLAMP 32mm (PAIRE)   | 1        | 1        | 1        | 1        |

9007790A & 9007791A  
Ceinture Bodypoint, Evoflex, boucle Rehab  
moyen 46cm (18po) & grand 62cm (24po)




9007792A & 9007793A  
Ceinture Bodypoint, Evoflex, pivotante  
petit 38cm (15po) & moyen 46cm (18po)

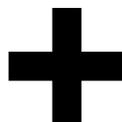

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9007808B-00**  
**CEINTURE - TYPE AVION, 35po**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                    | QTÉ |
|----------|-------------|--------------------------------|-----|
| 1        | 0051028B-00 | CEINTURE BOUCLE AVION 35po     | 1   |
| 2        | 0060500A-00 | FRAME SAVER (SAC DE 2 / 60201) | 1   |

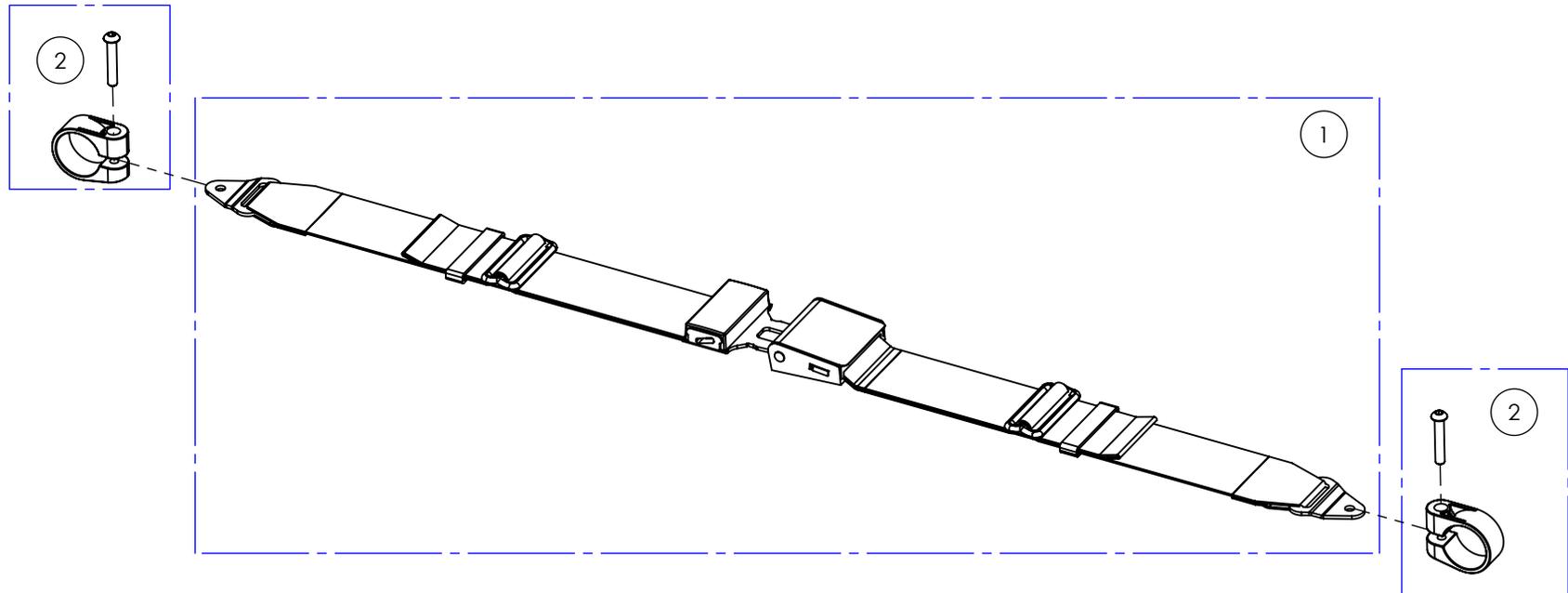

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES



**Catalogue de ceintures**  
**Attaches pour ceinture de sécurité à deux points**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 1        | 9002220A-00 | QUINCAILLERIE - BAGUES SUPPLÉMENTAIRES (2) | 1   |

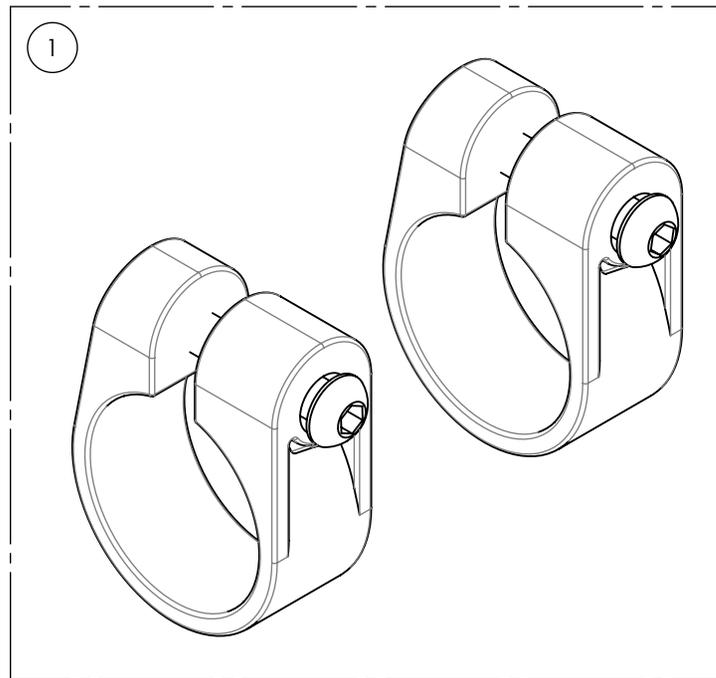


**Catalogue de ceintures**  
**Ceintures de positionnement**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                  | QTÉ |
|----------|-------------|------------------------------|-----|
| 1        | 9001587A-00 | CEINTURE - TYPE VELCRO, 35po | 1   |
| 2        | 9002138A-00 | CEINTURE - TYPE VELCRO, 60po | 1   |
| 3        | 9001588B-00 | CEINTURE - TYPE AUTO, 35po   | 1   |
| 4        | 9002139B-00 | CEINTURE - TYPE AUTO, 60po   | 1   |
| 5        | 9007808B-00 | CEINTURE - TYPE AVION, 35po  | 1   |

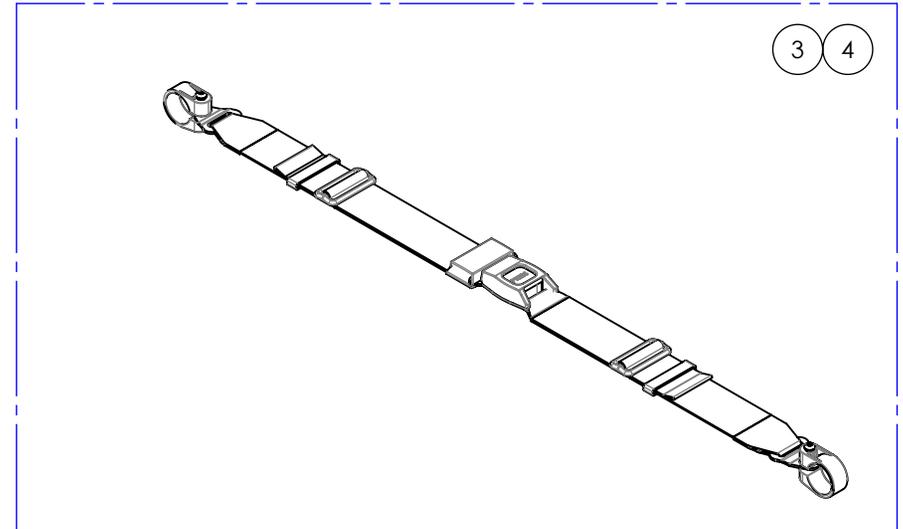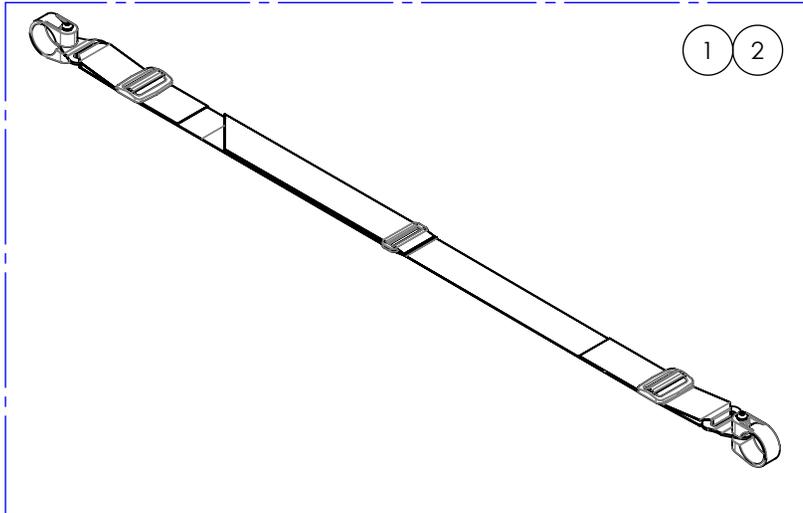


CHACUN DES ITEMS INCLUS DÉJÀ LE  
NOMBRE D'ATTACHES NÉCESSAIRE

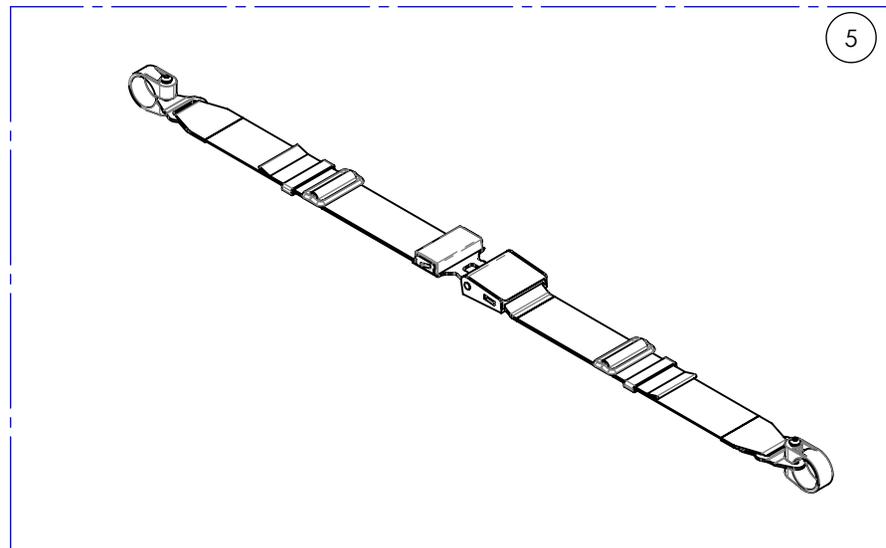

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


**Catalogue de ceintures**  
**Ceinture de positionnement - Bodypoint**

LES ITEMS 1 À 8 INCLUS DÉJÀ LE NOMBRE  
 D'ATTACHES NÉCESSAIRE

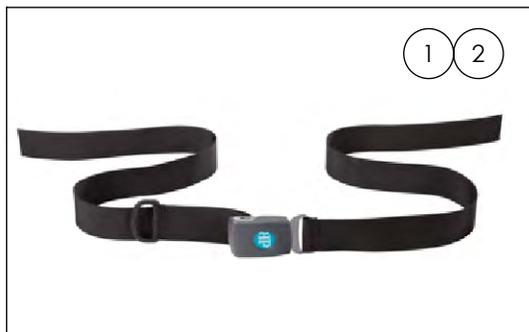


| #Item | #Pièce  | Description  | A          | B            | C            | D           |
|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|-------------|
| 1     | 9002221 | Ceinture Bodypoint, non-rembourrée 2 Points, moyen | 4cm (1 ½") | -            | -            | 142cm (56") |
| 2     | 9002222 | Ceinture Bodypoint, non-rembourrée 2 Points, large | 5cm (2")   | -            | -            | 155cm (61") |
| 3     | 9002223 | Ceinture Bodypoint, rembourrée 2 Points, petit     | 4cm (1 ½") | 36cm (14")   | 5.5cm (2 ¼") | 130cm (51") |
| 4     | 9002224 | Ceinture Bodypoint, rembourrée 2 Points, moyen     | 4cm (1 ½") | 46cm (18")   | 5.5cm (2 ¼") | 142cm (56") |
| 5     | 9002225 | Ceinture Bodypoint, rembourrée 2 Points, large     | 5cm (2")   | 62cm (24 ½") | 7cm (2 ¾")   | 155cm (61") |
| 6     | 9002226 | Ceinture Bodypoint, rembourrée 4 Points, petit     | 4cm (1 ½") | 36cm (14")   | 5.5cm (2 ¼") | 130cm (51") |
| 7     | 9002227 | Ceinture Bodypoint, rembourrée 4 Points, moyen     | 4cm (1 ½") | 46cm (18")   | 5.5cm (2 ¼") | 142cm (56") |
| 8     | 9002228 | Ceinture Bodypoint, rembourrée 4 Points, large     | 5cm (2")   | 62cm (24 ½") | 7cm (2 ¾")   | 155cm (61") |

**Ceinture non-rembourrée**

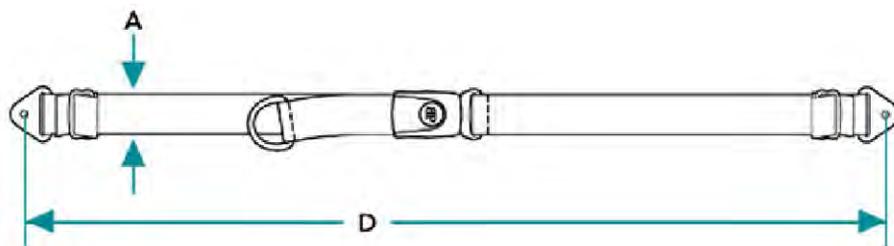

**Ceinture rembourrée**

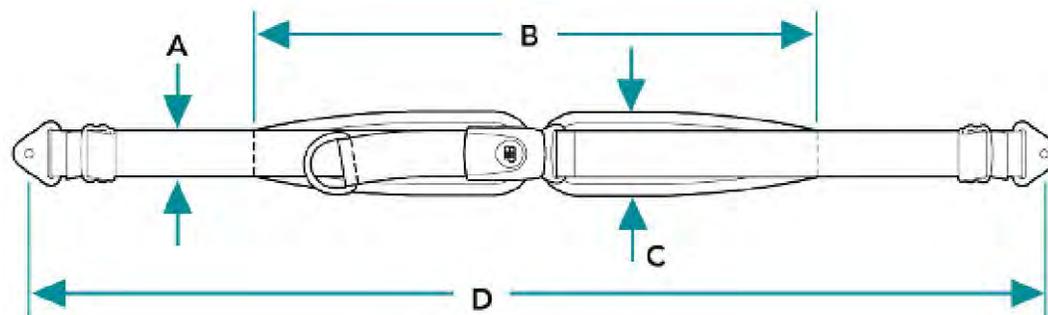


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES



TOUS LES ITEMS INCLUS DÉJÀ UNE PAIRE D'ATTACHE




| #Item | #Pièce      | Description  | A          | B            | C            | D            |
|-------|-------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1     | 9007790A-00 | CEINTURE - BODYPOINT, EVOFLEX, BOUCLE REHAB, MOYEN | 2.5cm (1") | 38cm (15")   | 5cm (2")     | 63cm (24 ¾") |
| 2     | 9007791A-00 | CEINTURE - BODYPOINT, EVOFLEX, BOUCLE REHAB, GRAND | 4cm (1 ½") | 46cm (18")   | 5.5cm (2 ¼") | 76cm (29 ¾") |
| 3     | 9007792A-00 | CEINTURE - BODYPOINT, EVOFLEX, PIVOTANTE, PETIT    | 4cm (1 ½") | 46cm (18")   | 5.5cm (2 ¼") | 76cm (29 ¾") |
| 4     | 9007793A-00 | CEINTURE - BODYPOINT, EVOFLEX, PIVOTANTE, MOYEN    | 5cm (2")   | 62cm (24 ½") | 7cm (2 ¾")   | 96cm (37 ¾") |

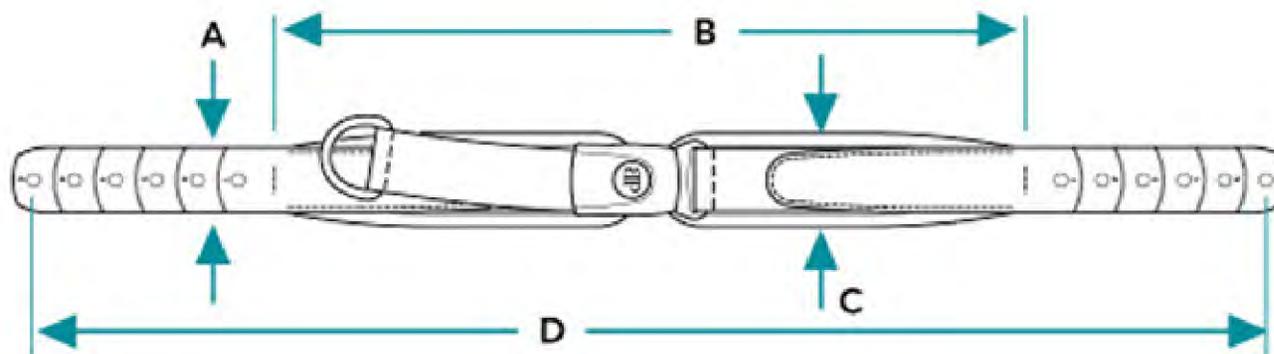


**0007356A-00**  
**KIT ISO7176-19 - HELIO A6/A7**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                           | QTÉ |
|----------|-------------|---------------------------------------|-----|
| 1        | 0090659A-00 | VIS TÊTE BOMBÉE M6x1x16mm L           | 4   |
| 2        | 0002515A-00 | ANCRAGE AVANT ISO 7176-19             | 2   |
| 3        | 0007191A-00 | AUTOCOLLANT AVERTISSEMENT ISO 7176-19 | 4   |
| 4        | 0051149A-00 | TIE DOWN WC-19                        | 2   |
| 5        | 0051151A-00 | RONDELLE BELLEVILLE WC-19             | 2   |
| 6        | 0051152A-00 | RONDELLE PLASTIQUE WC-19              | 2   |
| 7        | 0051150C-00 | VIS WC-19                             | 2   |
| 8        | 0032120B-00 | BAGUE SERRAGE DOSSIER ID 32mm         | 2   |
| 9        | 0007215A-00 | ÉTIQUETTE ISO 7176-19                 | 1   |
| 10       | 0091056A-00 | ESPACEUR M10x14mm ODX4mm L            | 2   |

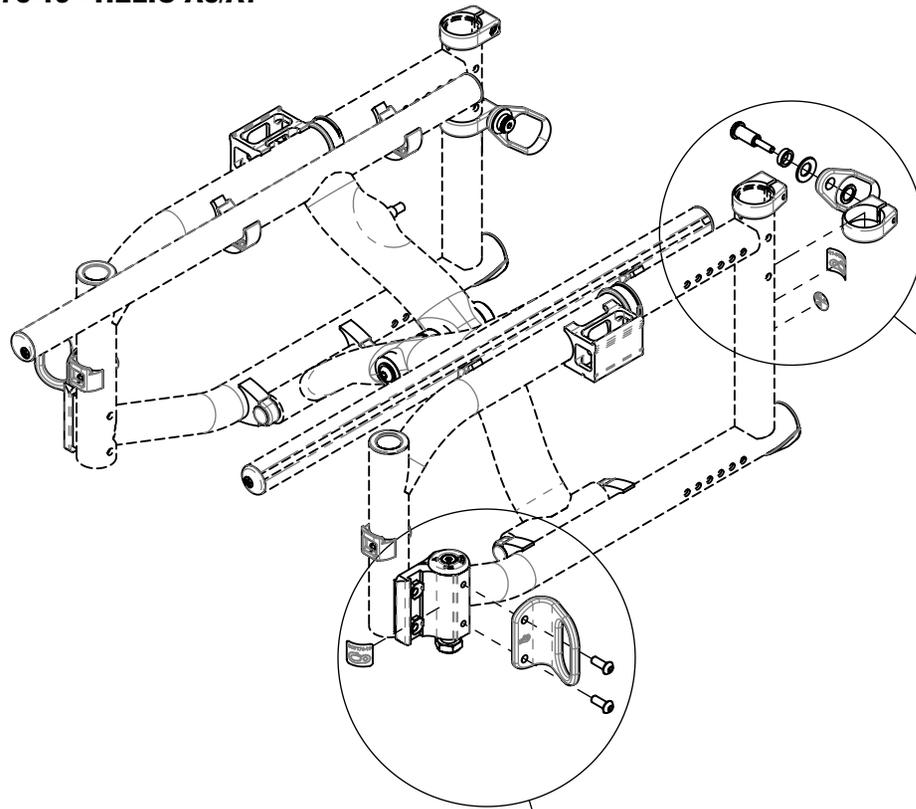


AUTOCOLLANT ISO7176-19  
 (0007191A-00) DOIVENT ÊTRE  
 POSITIONNÉS PRÈS DE CHACUN  
 DES ANCRAGES

3

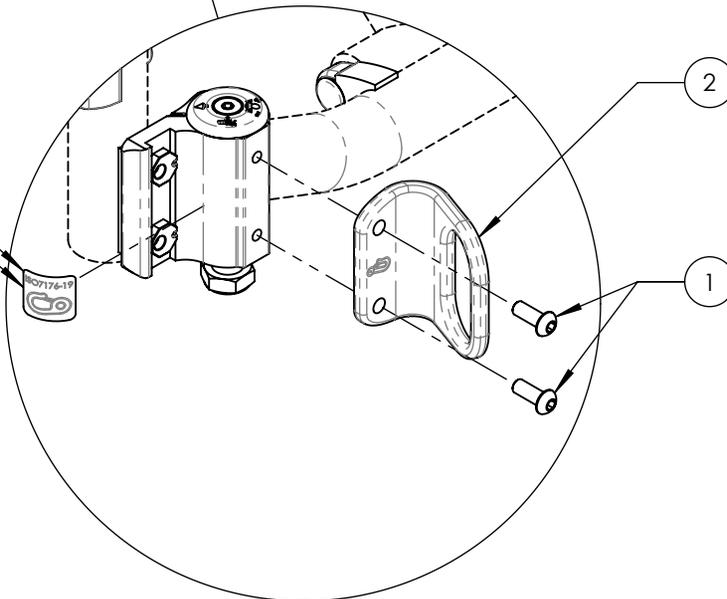

2

7

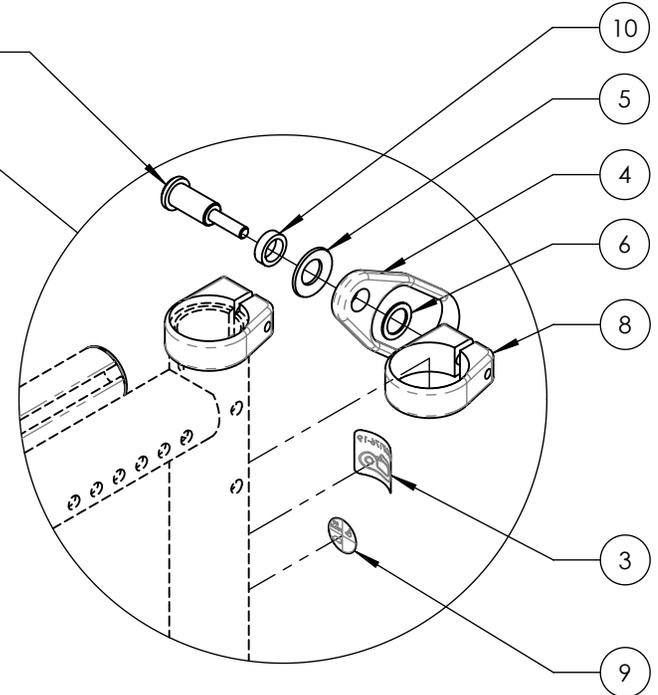


**LA MISE A NIVEAU ISO7176-19 DOIT ÊTRE  
 SÉLECTIONNÉE AU MOMENT DE LA  
 COMMANDE DU FAUTEUIL (DES  
 AJUSTEMENTS SPÉCIFIQUES SONT REQUIS)**

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**0007381A-00**  
**RUBANS REFLECTEURS**


| No. ITEM | No. PIECE   | DESCRIPTION               | QTE |
|----------|-------------|---------------------------|-----|
| 1        | 0051328A-00 | RUBAN RÉFLÉCHISSANT BLANC | 4   |
| 2        | 0051328A-01 | RUBAN RÉFLÉCHISSANT ROUGE | 2   |

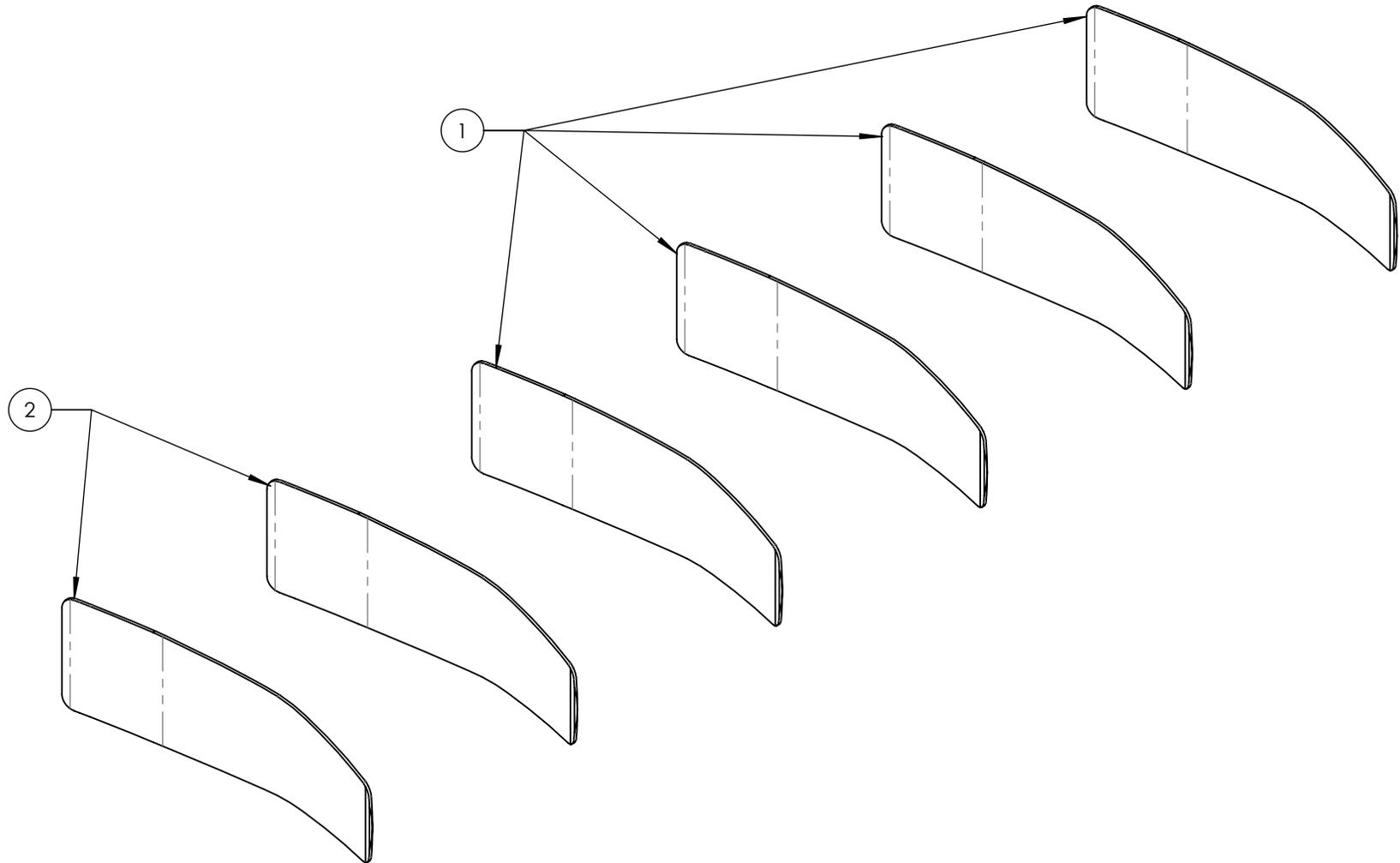




ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001614A 9001615A  
ANTI-BASCULANT PETIT & EXTENSION**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                       | 9001614 | 9001615 |
|----------|-------------|-----------------------------------|---------|---------|
| 1        | 0051517A-00 | EXTENSION ANTI-BASCULANT V2 COURT | 1       | -       |
| 2        | 0051518A-00 | EXTENSION ANTI-BASCULANT V2 LONG  | -       | 1       |
| 3        | 0051519B-00 | ANTI-BASCULANT V2 PETIT - ASSY    | 1       | 1       |

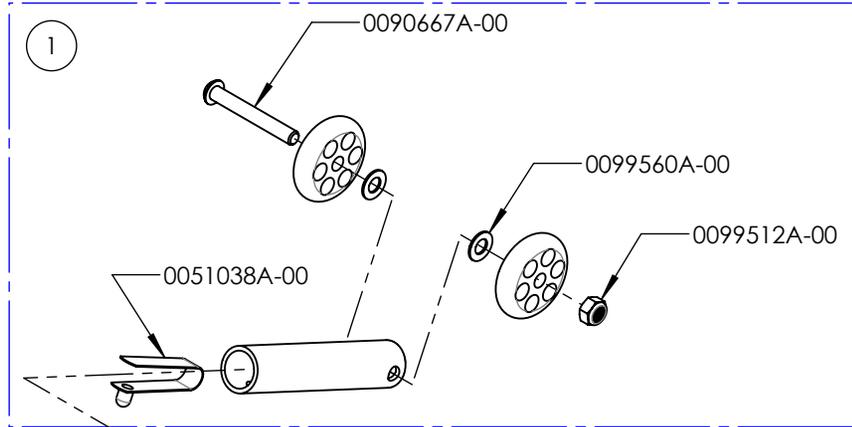

9001614A-00  
ANTI-BASCULANT - PETIT & EXT COURTE

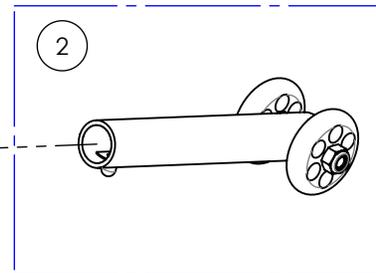
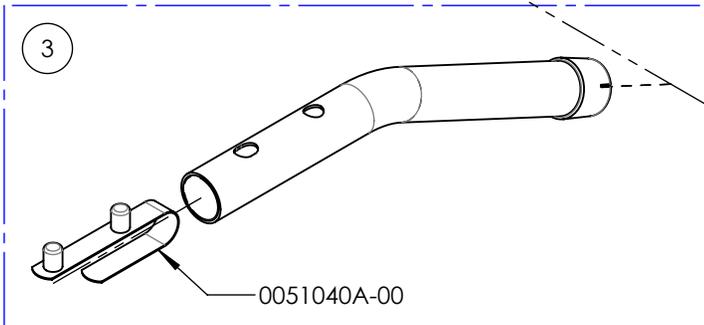
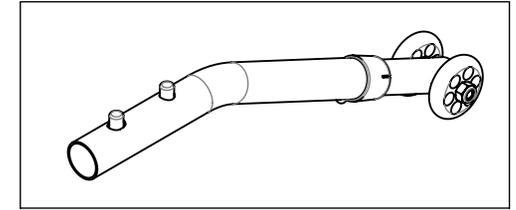


9001615A-00  
ANTI-BASCULANT - PETIT & EXT LONGUE

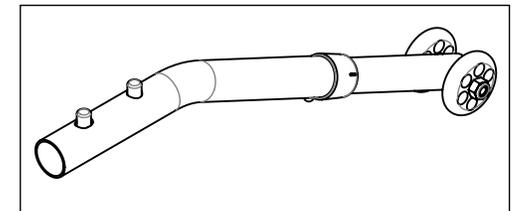


**9001616A 9001617A**  
**ANTI-BASCULANT MOYEN & EXTENSION**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                       | 9001616 | 9001617 |
|----------|-------------|-----------------------------------|---------|---------|
| 1        | 0051517A-00 | EXTENSION ANTI-BASCULANT V2 COURT | 1       | -       |
| 2        | 0051518A-00 | EXTENSION ANTI-BASCULANT V2 LONG  | -       | 1       |
| 3        | 0051520B-00 | ANTI-BASCULANT V2 MOYEN - ASSY    | 1       | 1       |

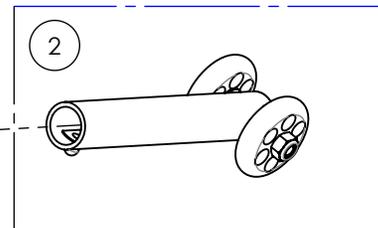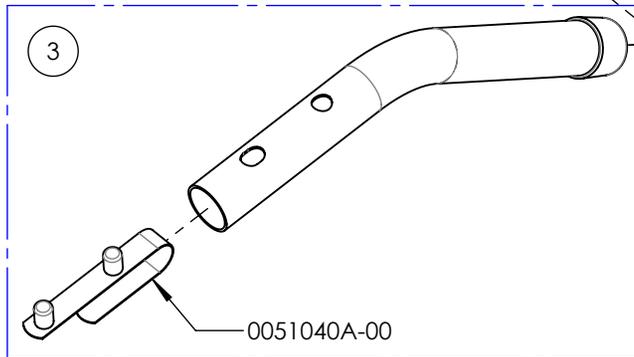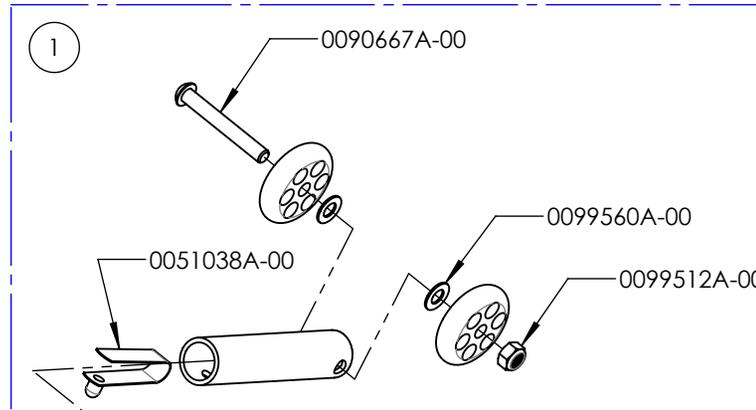

9001616A-00  
 ANTI-BASCULANT - MOYEN & EXT COURTE

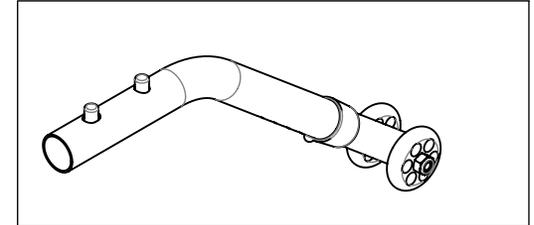


9001617A-00  
 ANTI-BASCULANT - MOYEN & EXT LONGUE

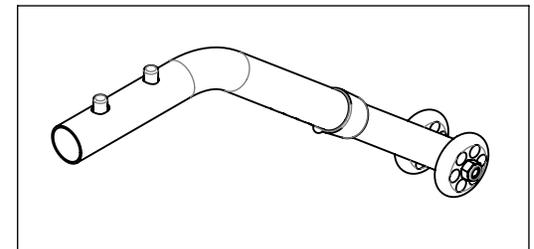



ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
 PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
 POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001618A 9001619A  
ANTI-BASCULANT GRAND & EXTENSION**



| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                       | 9001618 | 9001619 |
|----------|-------------|-----------------------------------|---------|---------|
| 1        | 0051517A-00 | EXTENSION ANTI-BASCULANT V2 COURT | 1       | -       |
| 2        | 0051518A-00 | EXTENSION ANTI-BASCULANT V2 LONG  | -       | 1       |
| 3        | 0051521B-00 | ANTI-BASCULANT V2 GRAND - ASSY    | 1       | 1       |

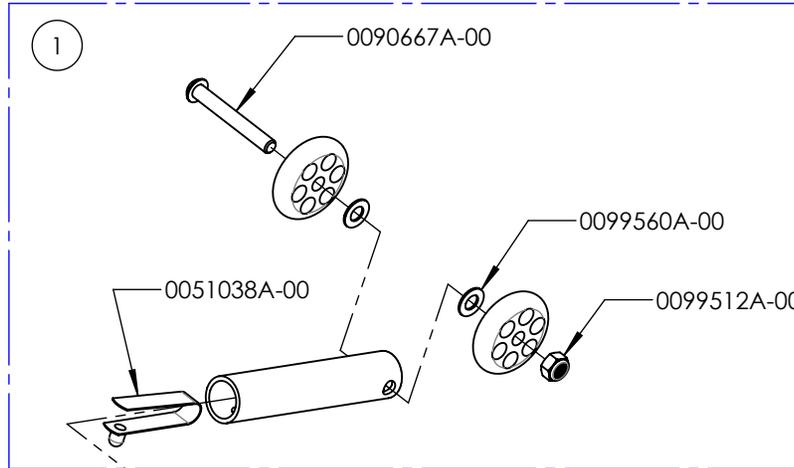

9001618A-00  
ANTI-BASCULANT - GRAND & EXT COURTE

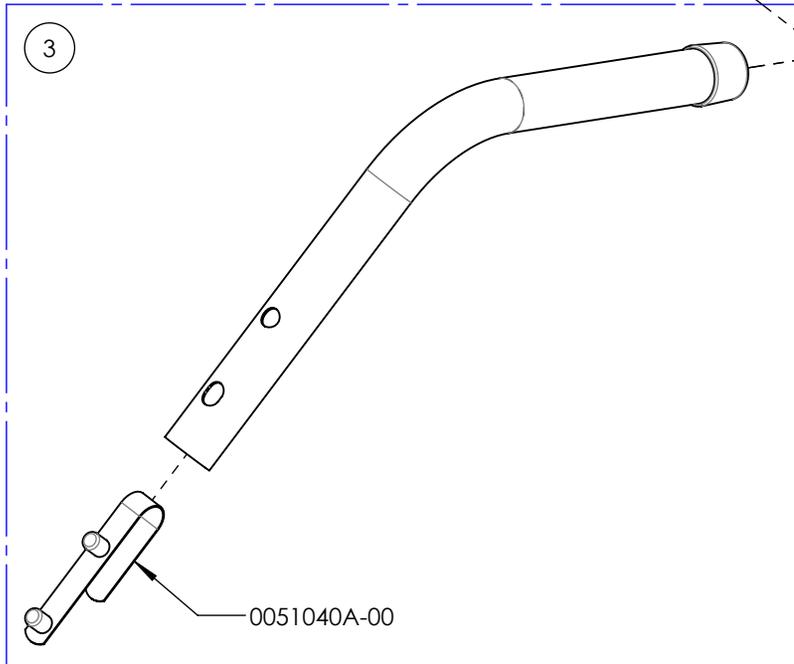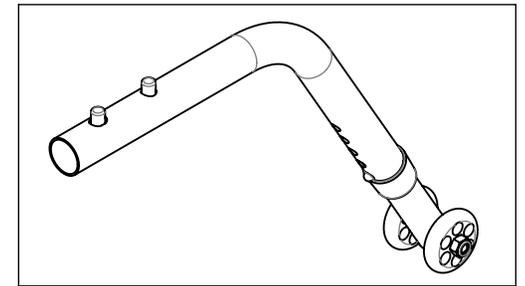


9001619A-00  
ANTI-BASCULANT - GRAND & EXT LONGUE

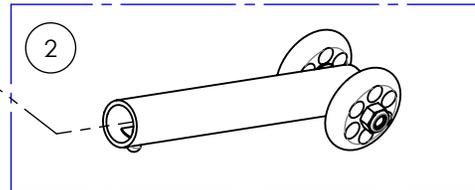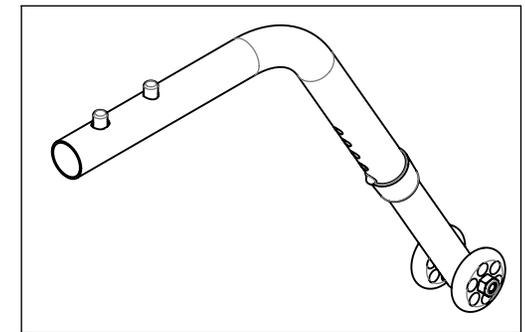



ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001620A 9001621A**  
**ANTI-BASCULANT EXTRA-PETIT & EXTENSION**



| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                       | 9001620 | 9001621 |
|----------|-------------|-----------------------------------|---------|---------|
| 1        | 0051517A-00 | EXTENSION ANTI-BASCULANT V2 COURT | 1       | -       |
| 2        | 0051518A-00 | EXTENSION ANTI-BASCULANT V2 LONG  | -       | 1       |
| 3        | 0051513B-00 | ANTI-BASCULANT V2 X-PETIT - ASSY  | 1       | 1       |

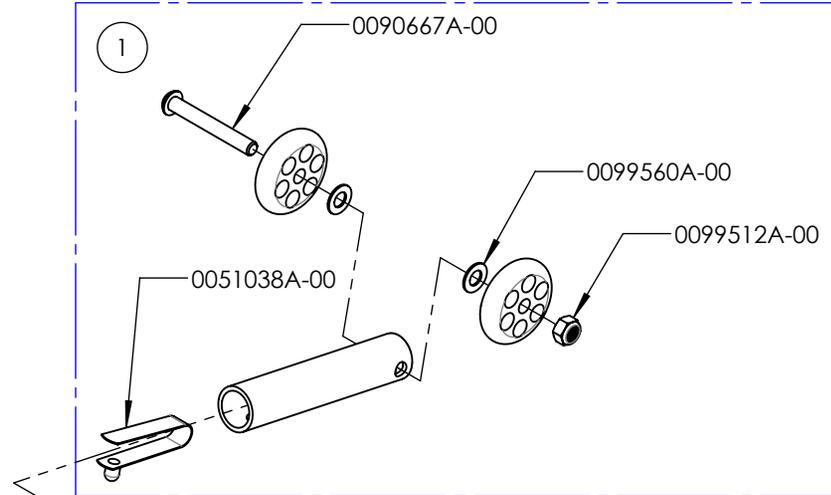

9001620A-00  
 ANTI-BASCULANT - EXTRA-PETIT & EXT COURTE

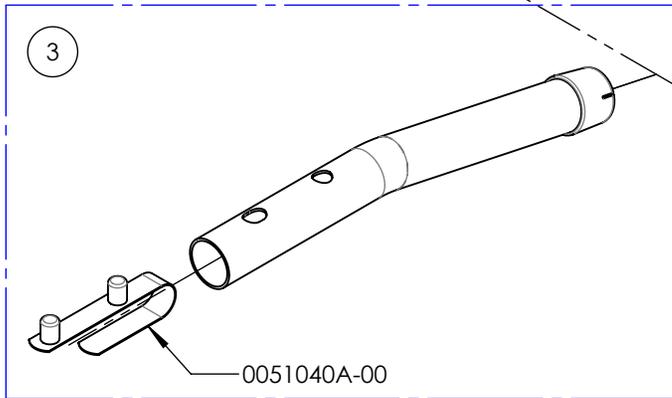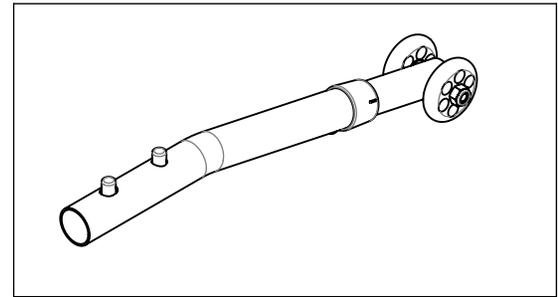


9001621A-00  
 ANTI-BASCULANT - EXTRA-PETIT & EXT LONGUE

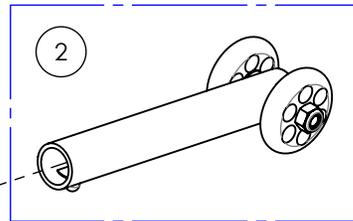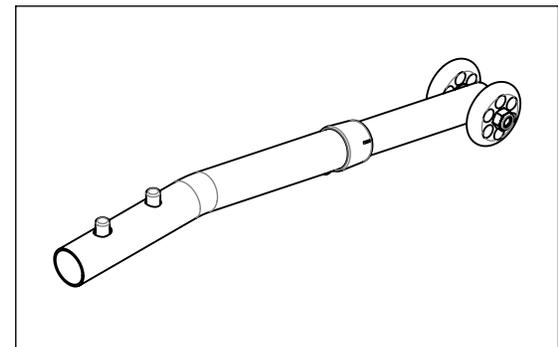


**9001627A\_9001628A**  
**PORTE-CANNE**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                 | 9001628 | 9001627 |
|----------|-------------|-----------------------------|---------|---------|
| 1        | 0051506A-00 | PORTE CANNE, GAUCHE - ASSY  | 1       | -       |
| 1        | 0051505A-00 | PORTE CANNE, DROIT - ASSY   | -       | 1       |
| 2        | 0041501A-00 | BAGUE DE FREIN - ASSEMBLAGE | 1       | 1       |
| 3        | 0051023A-00 | COURROIE PORTE CANNE        | 1       | 1       |

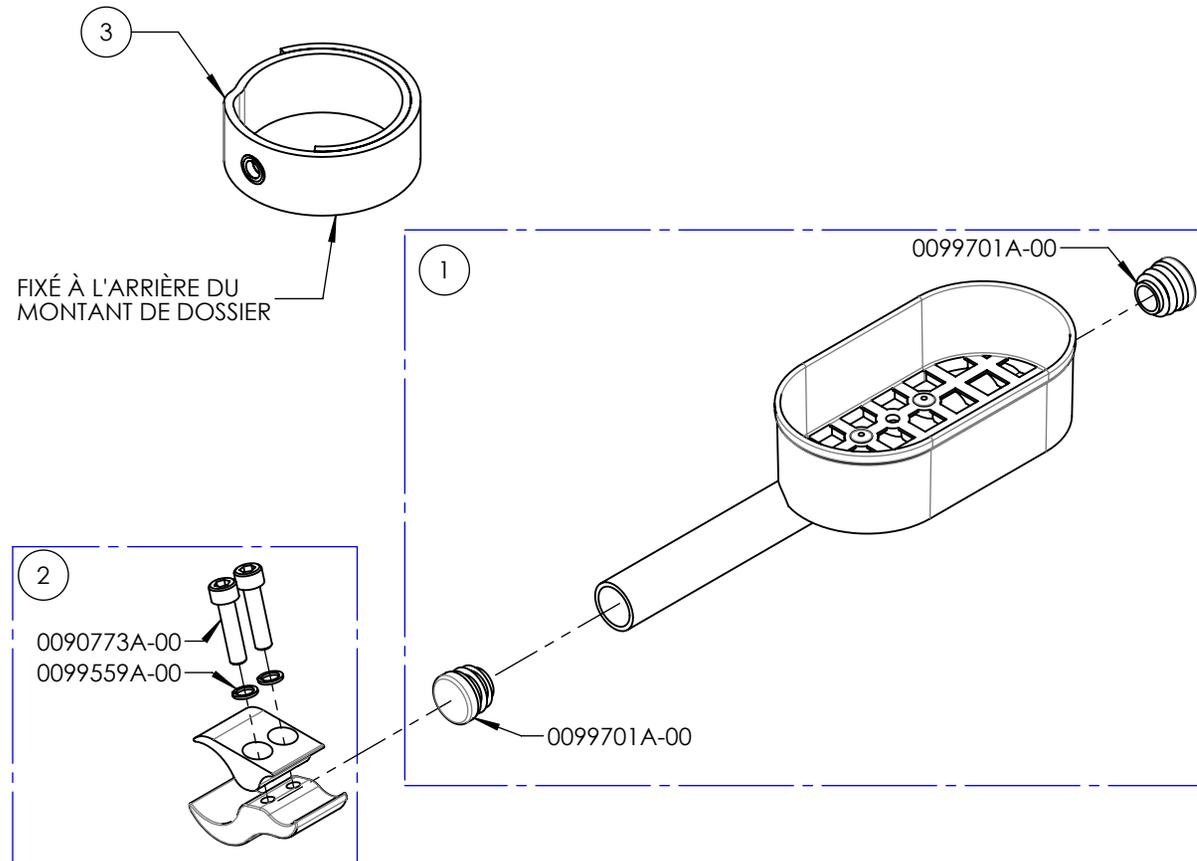

9001627A-00 - PORTE-CANNE - DROITE

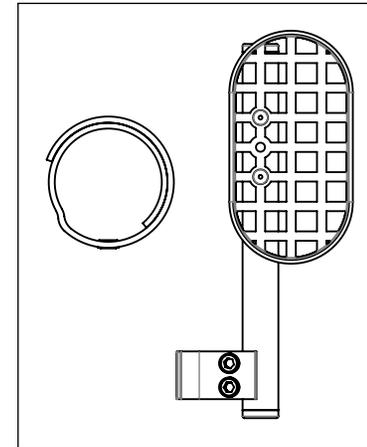



9001628A-00 - PORTE-CANNE - GAUCHE

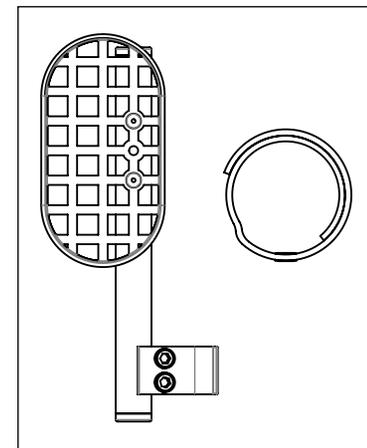

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**0060501A-00**  
**Support de bonbonne oxygène**

| No. ITEM | DESCRIPTION                           | QTÉ |
|----------|---------------------------------------|-----|
| 1        | SUPPORT BOMBONNE OXYGÈNE - ASSEMBLAGE | 1   |

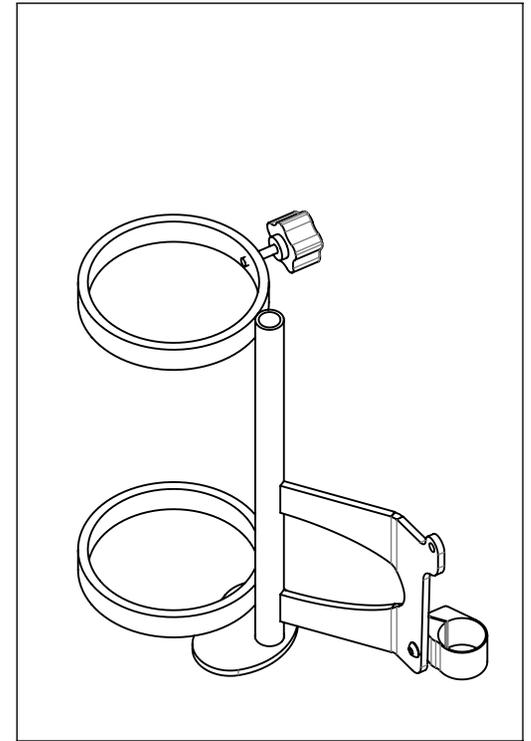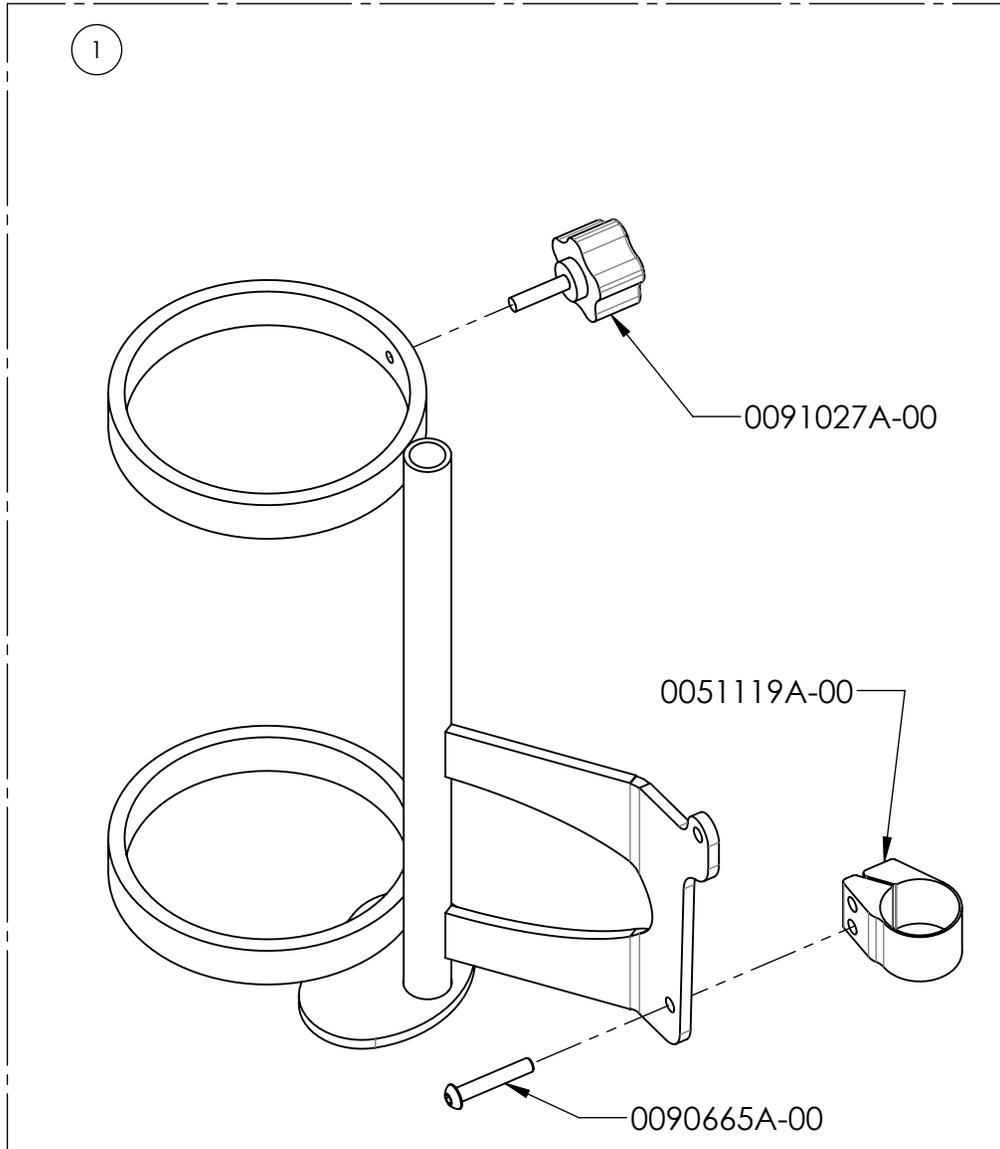

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9001643B-00**  
**ENSEMBLE D'OUTILS**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION             | QTÉ |
|----------|-------------|-------------------------|-----|
| 1        | 0051120B-00 | ENSEMBLE OUTIL METRIQUE | 1   |
| 2        | 0080001A-00 | OUTIL FILLETÉ           | 1   |




ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**9007930A-00**  
**ANTI-BASCULANT PIVOTANT & INSTRUCTION**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                     | QTÉ |
|----------|-------------|---|-----|
| 1        | 0002343A-00 | ANTI-BASCULANT PIVOTANT                         | 1   |
| 2        | 0006058A-00 | INSTRUCTION ASSEMBLAGE ANTI-BASC. PIVOTANT - AN | 1   |
| 3        | 0006059A-00 | INSTRUCTION ASSEMBLAGE ANTI-BASC. PIVOTANT - FR | 1   |





**INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE INCLUS (FRANÇAIS & ANGLAIS)**

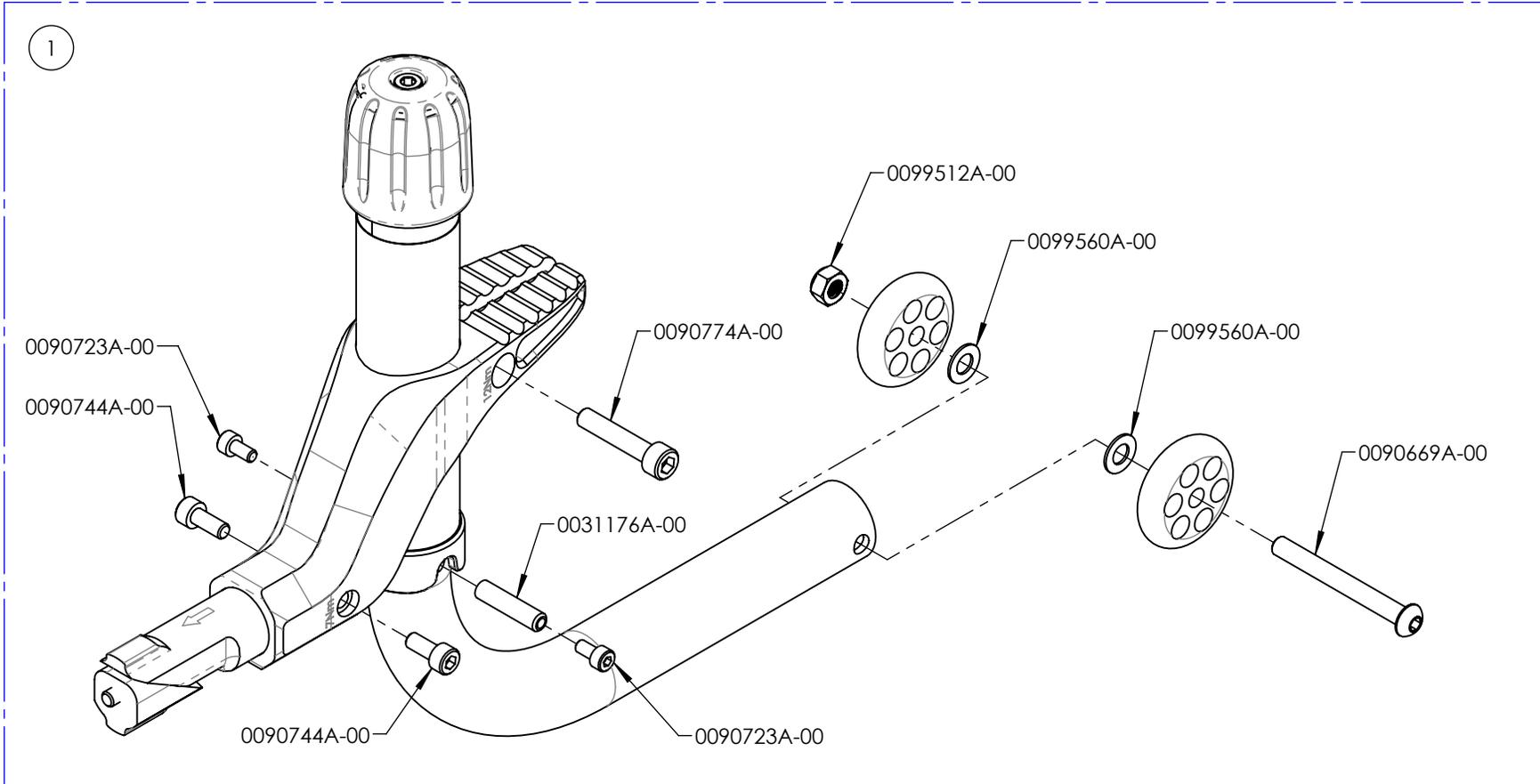

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue d'accessoires  
Anti-basculants**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                               | QTÉ |
|----------|-------------|---|-----|
| 1        | 9001620A-00 | ANTI-BASCULANT - EXTRA-PETIT & EXT COURTE | 1   |
| 2        | 9001621A-00 | ANTI-BASCULANT - EXTRA-PETIT & EXT LONGUE | 1   |
| 3        | 9001614A-00 | ANTI-BASCULANT - PETIT & EXT COURTE       | 1   |
| 4        | 9001615A-00 | ANTI-BASCULANT - PETIT & EXT LONGUE       | 1   |
| 5        | 9001616A-00 | ANTI-BASCULANT - MOYEN & EXT COURTE       | 1   |
| 6        | 9001617A-00 | ANTI-BASCULANT - MOYEN & EXT LONGUE       | 1   |
| 7        | 9001618A-00 | ANTI-BASCULANT - GRAND & EXT COURTE       | 1   |
| 8        | 9001619A-00 | ANTI-BASCULANT - GRAND & EXT LONGUE       | 1   |

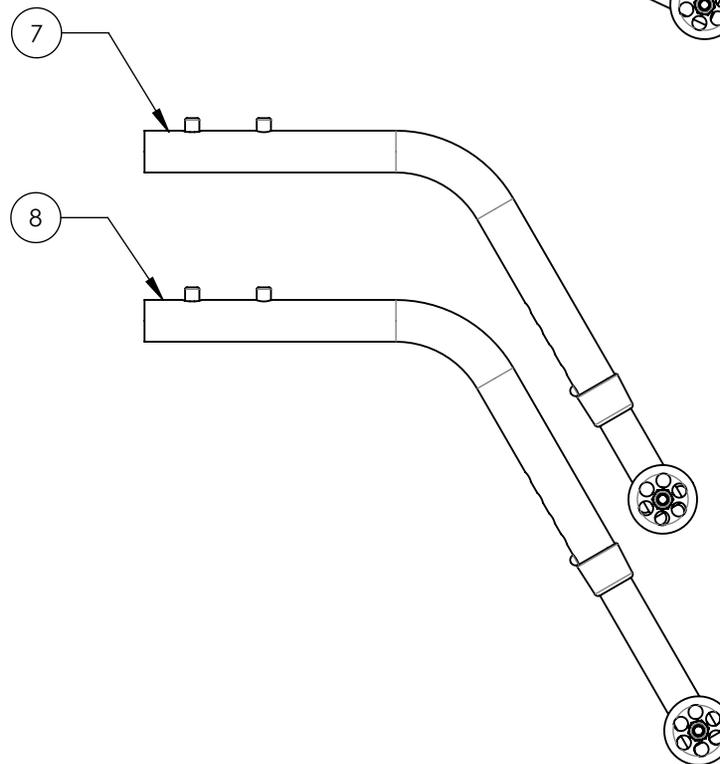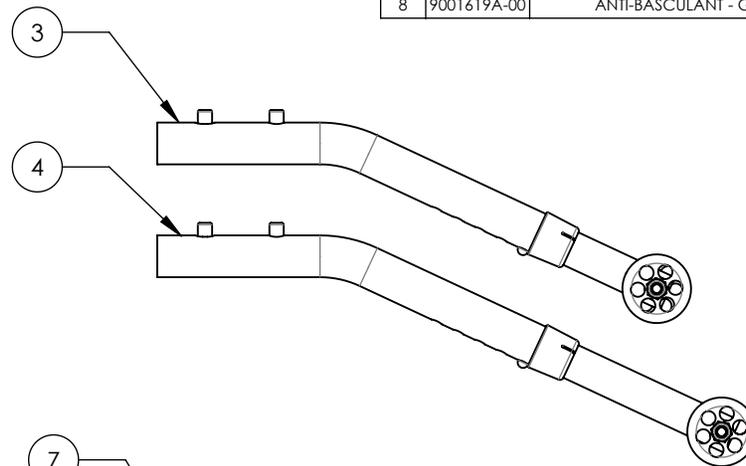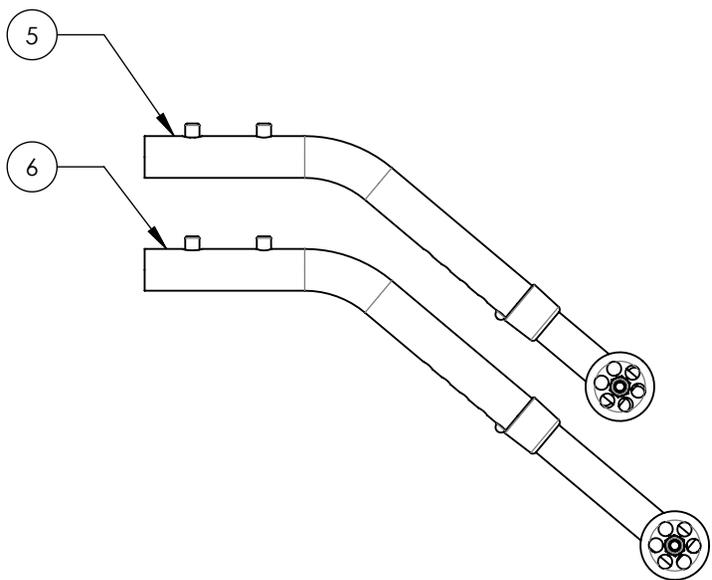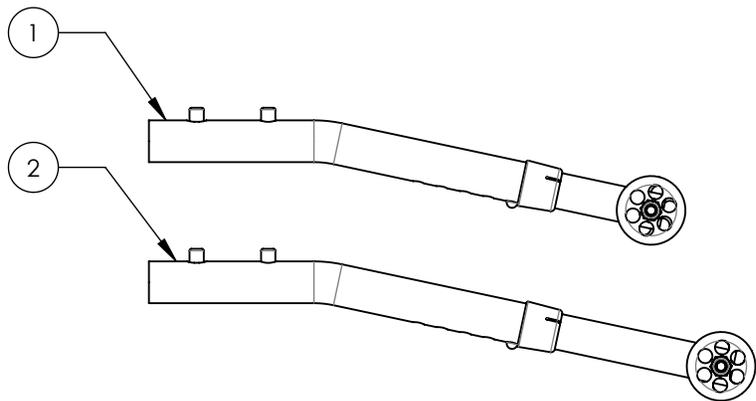

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                           | QTÉ |
|----------|-------------|---------------------------------------|-----|
| 1        | 9007930A-00 | ANTI-BASCULANT PIVOTANT & INSTRUCTION | 1   |

## INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE INCLUS (FRANÇAIS & ANGLAIS)

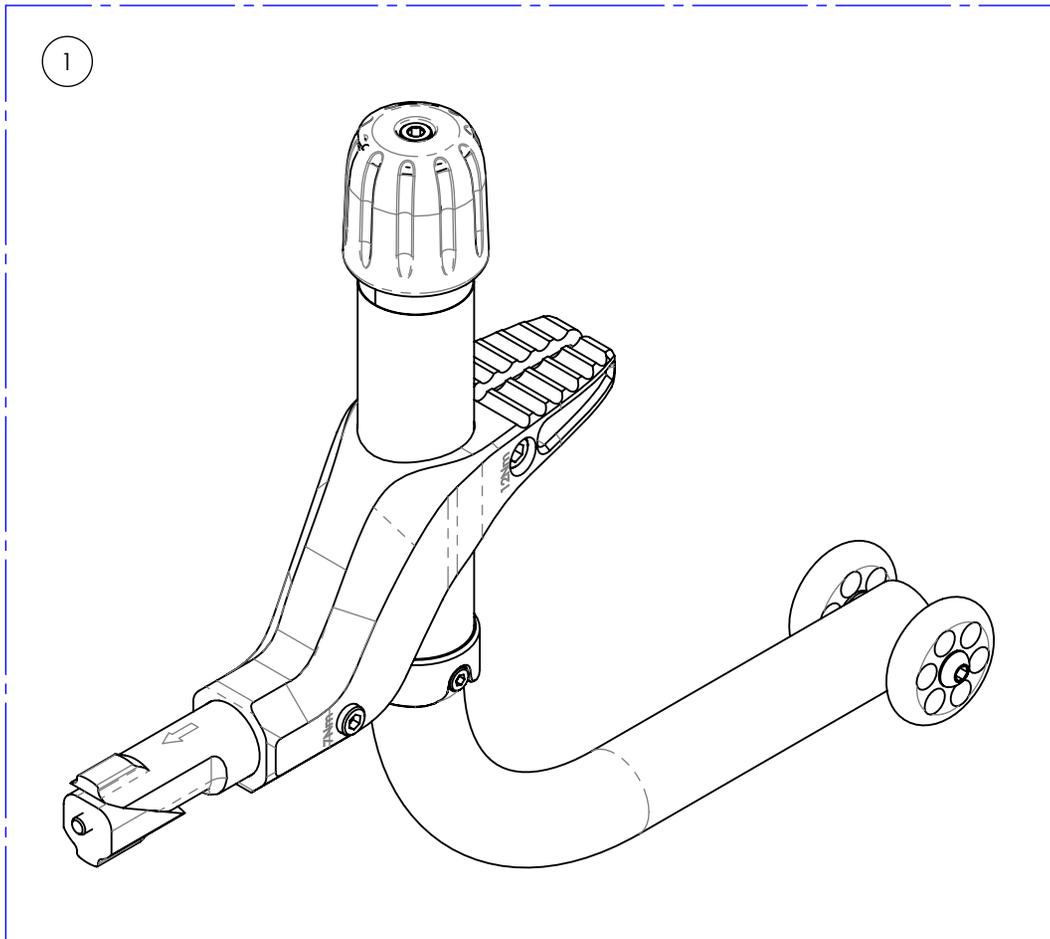

**L'ANTI-BASCULANT PIVOTANT PEUT ÊTRE INSTALLÉ  
À GAUCHE OU À DROITE**

**\*\*\* OPTION HD \*\*\***  
**LES FAUTEUILS AVEC L'OPTION HD DOIVENT AVOIR UN  
ANTI-BASCULANT INSTALLÉ À GAUCHE ET À DROITE**

**Catalogue d'accessoires**  
**Sac à dos Newton**

| NO. ITEM | NO. PIÈCE   | DESCRIPTION        | QTÉ |
|----------|-------------|--------------------|-----|
| 1        | 9003059A-00 | SAC À DOS - NEWTON | 1   |



20"  
51cm

13"  
33cm



ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue d'accessoires**  
**Sac Bodypoint Mobility**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION              | QTÉ |
|----------|-------------|--------------------------|-----|
| 1        | 9007794A-00 | SAC - BODYPOINT MOBILITY | 1   |



1



ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue d'accessoires**  
**Porte-cannes**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION          | QTÉ |
|----------|-------------|----------------------|-----|
| 1        | 9001627A-00 | PORTE-CANNE - DROITE | 1   |
| 2        | 9001628A-00 | PORTE-CANNE - GAUCHE | 1   |

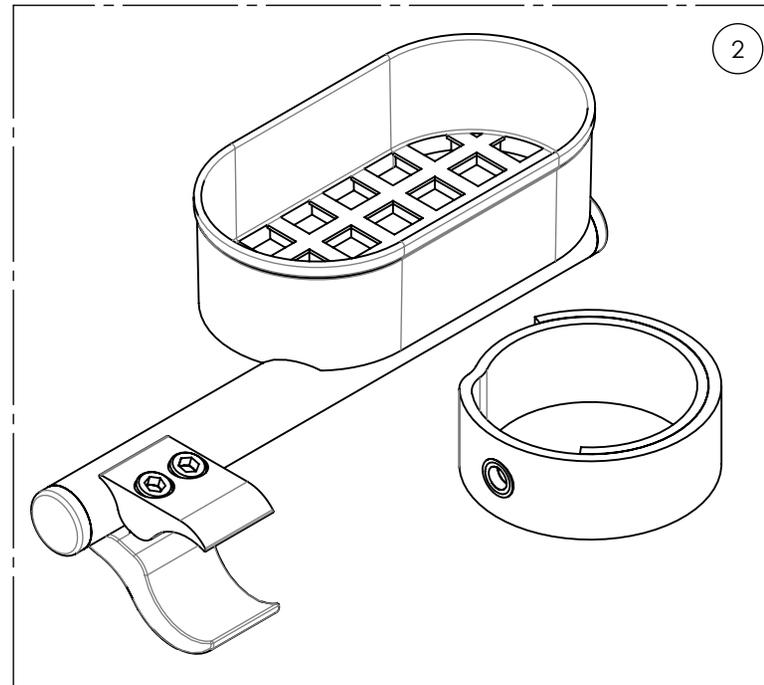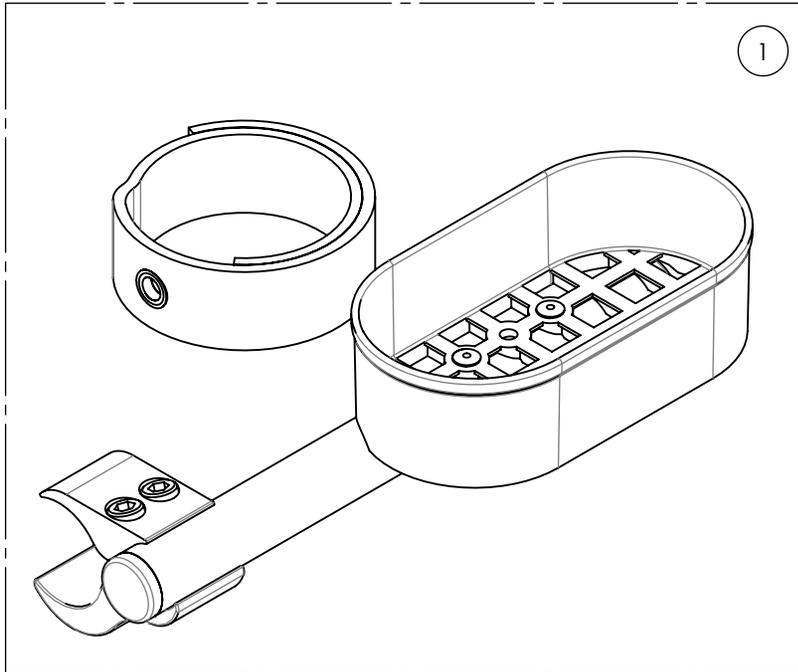


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue d'accessoires**  
**Courroies de fermeture à Velcro pour toile de siège**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                   | QTÉ |
|----------|-------------|---|-----|
| 1        | 9007615A-00 | COURROIE FERMETURE (SPÉCIFIER GRANDEUR TOILE) | 1   |

CONTACTEZ NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE AVANT DE COMMANDER UNE NOUVELLE TOILE DE SIÈGE AVEC COURROIE DE FERMETURE  
**(ASSUREZ-VOUS D'AVOIR LE NUMÉRO DE SÉRIE DU FAUTEUIL)**

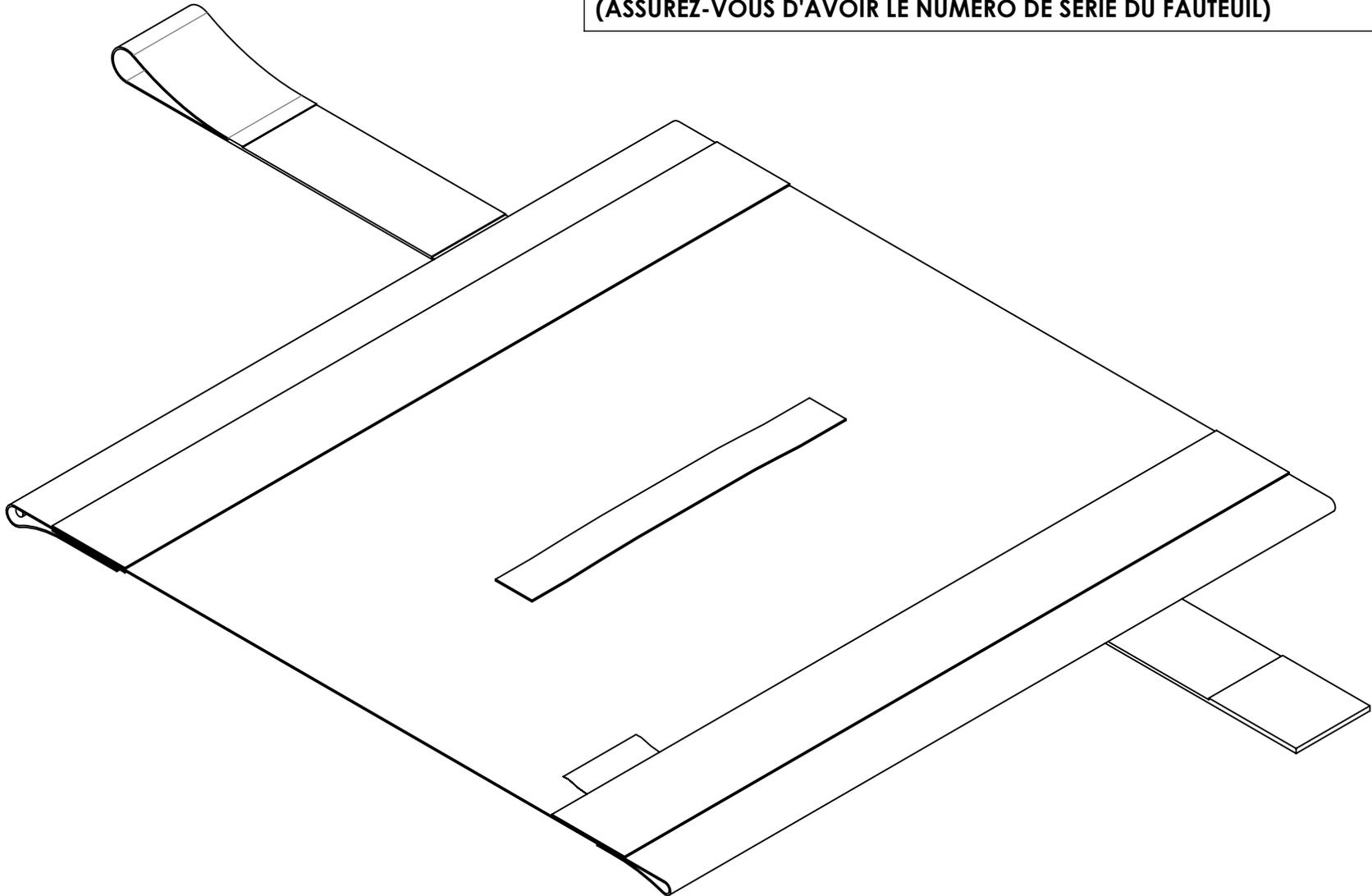

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue d'accessoires**  
**Protecteurs d'appui-pieds en néoprène**

| No. ITEM | No. PIÈCE | DESCRIPTION                                  | QTÉ |
|----------|-----------|--|-----|
| 1        | 9001633   | Protège appui-pieds - Néoprène, noir (Paire) | 1   |



ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue d'accessoires**  
**Pochette multi-usages désinfectante Newton**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 1        | 0006051A-00 | POCHETTE MULTI-USAGES DÉSINFECTANTE NEWTON | 1   |

1



**Catalogue d'accessoires**  
**Support à bonbonne d'oxygène**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                 | QTÉ |
|----------|-------------|-----------------------------|-----|
| 1        | 9001640A-00 | SUPPORT DE BONBONNE OXYGÈNE | 1   |

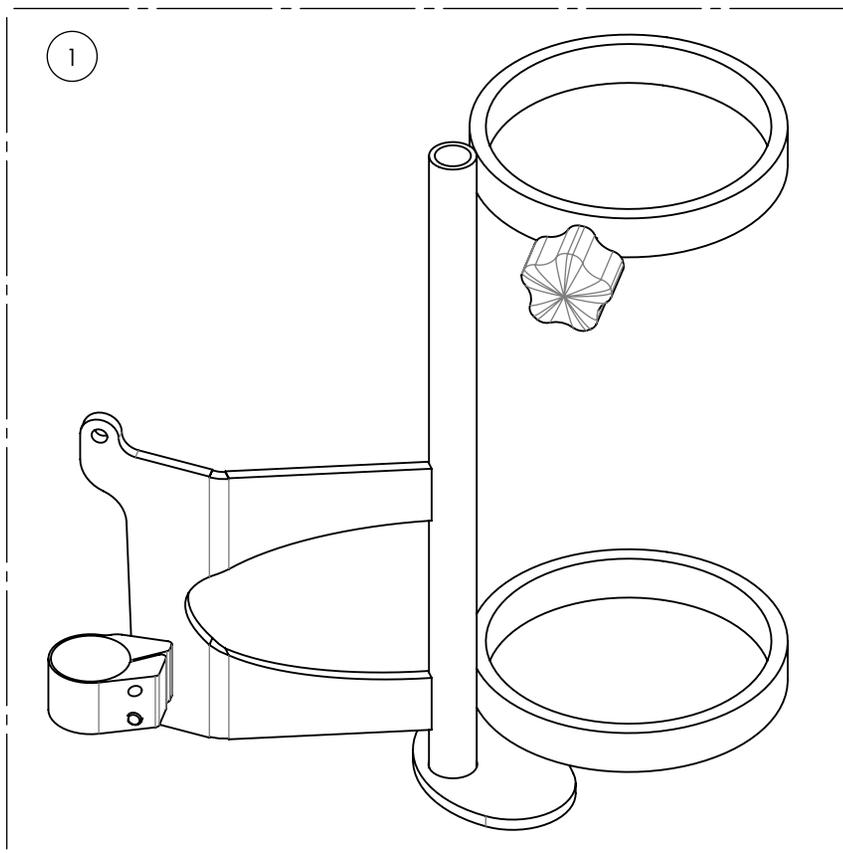

**Catalogue d'accessoires**  
**Polo Motion Composites**



| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                               | QTÉ |
|----------|-------------|---|-----|
| 1        | 9003049A-00 | POLO - MOTION COMPOSITES, HOMME, PETIT    | 1   |
| 2        | 9003050A-00 | POLO - MOTION COMPOSITES, HOMME, MOYEN    | 1   |
| 3        | 9003051A-00 | POLO - MOTION COMPOSITES, HOMME, LARGE    | 1   |
| 4        | 9003052A-00 | POLO - MOTION COMPOSITES, HOMME, X-LARGE  | 1   |
| 5        | 9003053A-00 | POLO - MOTION COMPOSITES, HOMME, 2X-LARGE | 1   |
| 6        | 9003054A-00 | POLO - MOTION COMPOSITES, HOMME, 3X-LARGE | 1   |
| 7        | 9003055A-00 | POLO - MOTION COMPOSITES, HOMME, 4X-LARGE | 1   |
| 8        | 9003056A-00 | POLO - MOTION COMPOSITES, FEMME, PETIT    | 1   |
| 9        | 9003057A-00 | POLO - MOTION COMPOSITES, FEMME, MOYEN    | 1   |
| 10       | 9003058A-00 | POLO - MOTION COMPOSITES, FEMME, LARGE    | 1   |

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue d'accessoires**  
**Pochette de siège**


| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                           | QTÉ |
|----------|-------------|---------------------------------------|-----|
| 1        | 9001634A-00 | POCHETTE DE SIÈGE - MOTION COMPOSITES | 1   |



ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue d'accessoires**  
**Levier de bascule**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION       | QTÉ |
|----------|-------------|-------------------|-----|
| 1        | 9007694A-00 | LEVIER DE BASCULE | 1   |

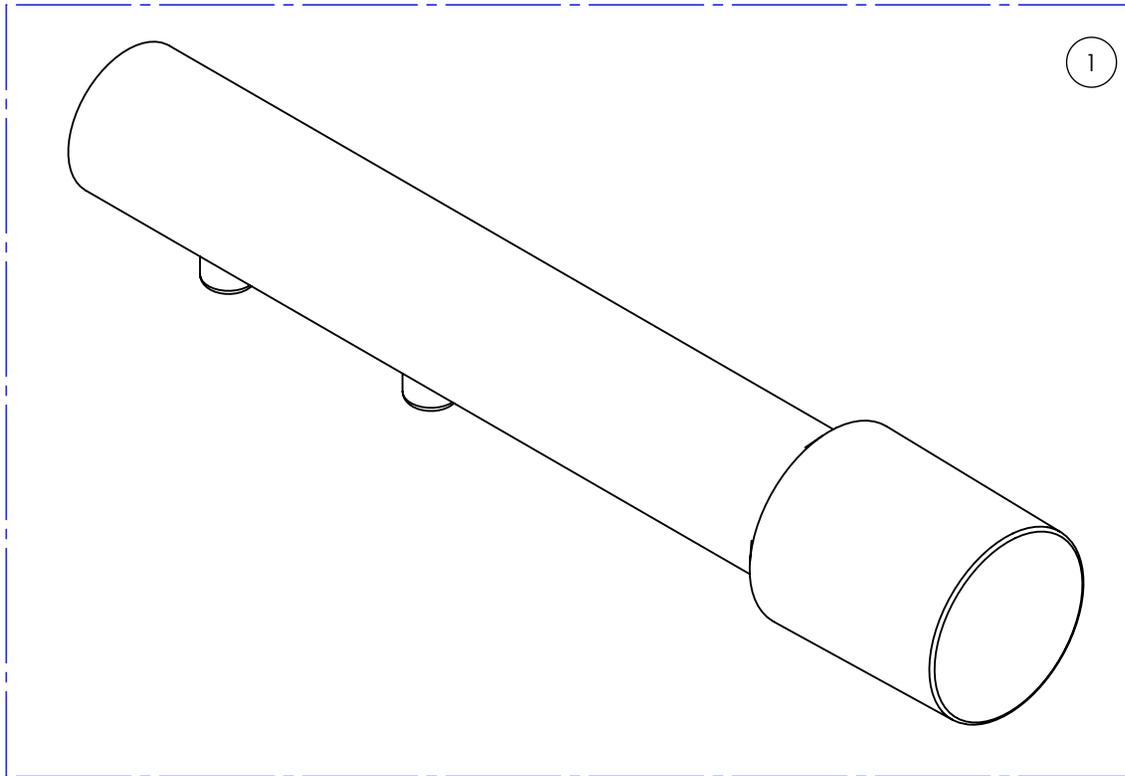

**Catalogue d'accessoires**  
**Ensemble d'outils**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                      | QTÉ |
|----------|-------------|----------------------------------|-----|
| 1        | 9001643B-00 | ENSEMBLE D'OUTILS                | 1   |
| 2        | 0051117A-00 | TOURNEVIS DE PRECISION HEX 1.5mm | 1   |



ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue d'options de couleurs  
Retouche de peinture**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                           | QTÉ |
|----------|-------------|---------------------------------------|-----|
| 1        | 0070358A-00 | RETOUCHE DE PEINTURE FUCHSIA          | 1   |
| 2        | 0070359A-00 | RETOUCHE DE PEINTURE BOURGOGNE        | 1   |
| 3        | 0070360A-00 | RETOUCHE DE PEINTURE FERRARI ROUGE    | 1   |
| 4        | 0070361A-00 | RETOUCHE DE PEINTURE ORANGE TANGERINE | 1   |
| 5        | 0070362A-00 | RETOUCHE DE PEINTURE VERT ACIDE       | 1   |
| 6        | 0070363A-00 | RETOUCHE DE PEINTURE VERT MONSTRE     | 1   |
| 7        | 0070364A-00 | RETOUCHE DE PEINTURE BLEU SAPHIRE     | 1   |
| 8        | 0070365A-00 | RETOUCHE DE PEINTURE BLEU ACIER       | 1   |
| 9        | 0070366A-00 | RETOUCHE DE PEINTURE ANTHRACITE       | 1   |
| 10       | 0070367A-00 | RETOUCHE DE PEINTURE NOIR             | 1   |


- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES


**Catalogue d'options de couleurs**  
**Échantillon de couleur**

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 1        | 0051587A-00 | ÉCHANTILLONS COULEUR PORTE CLÉ RAMQ - ASSY | 1   |

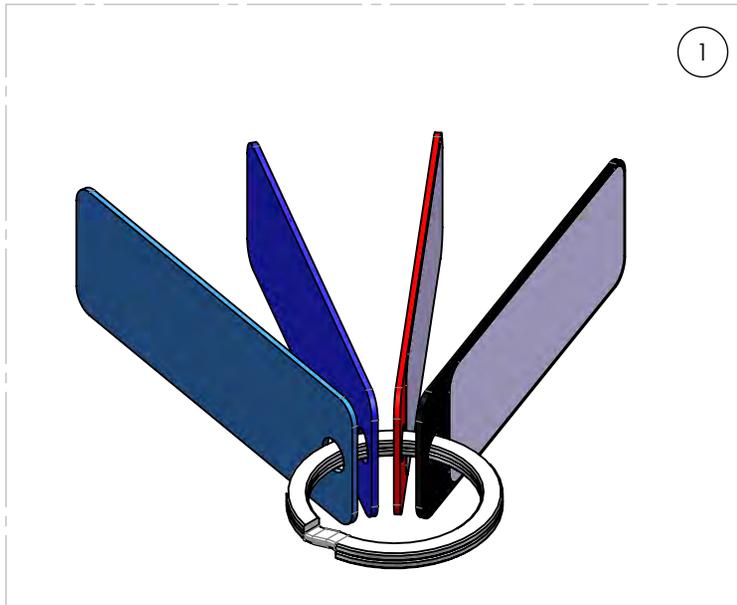

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE  
PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES  
POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

**Catalogue d'options de couleurs  
Autocollants Helio**

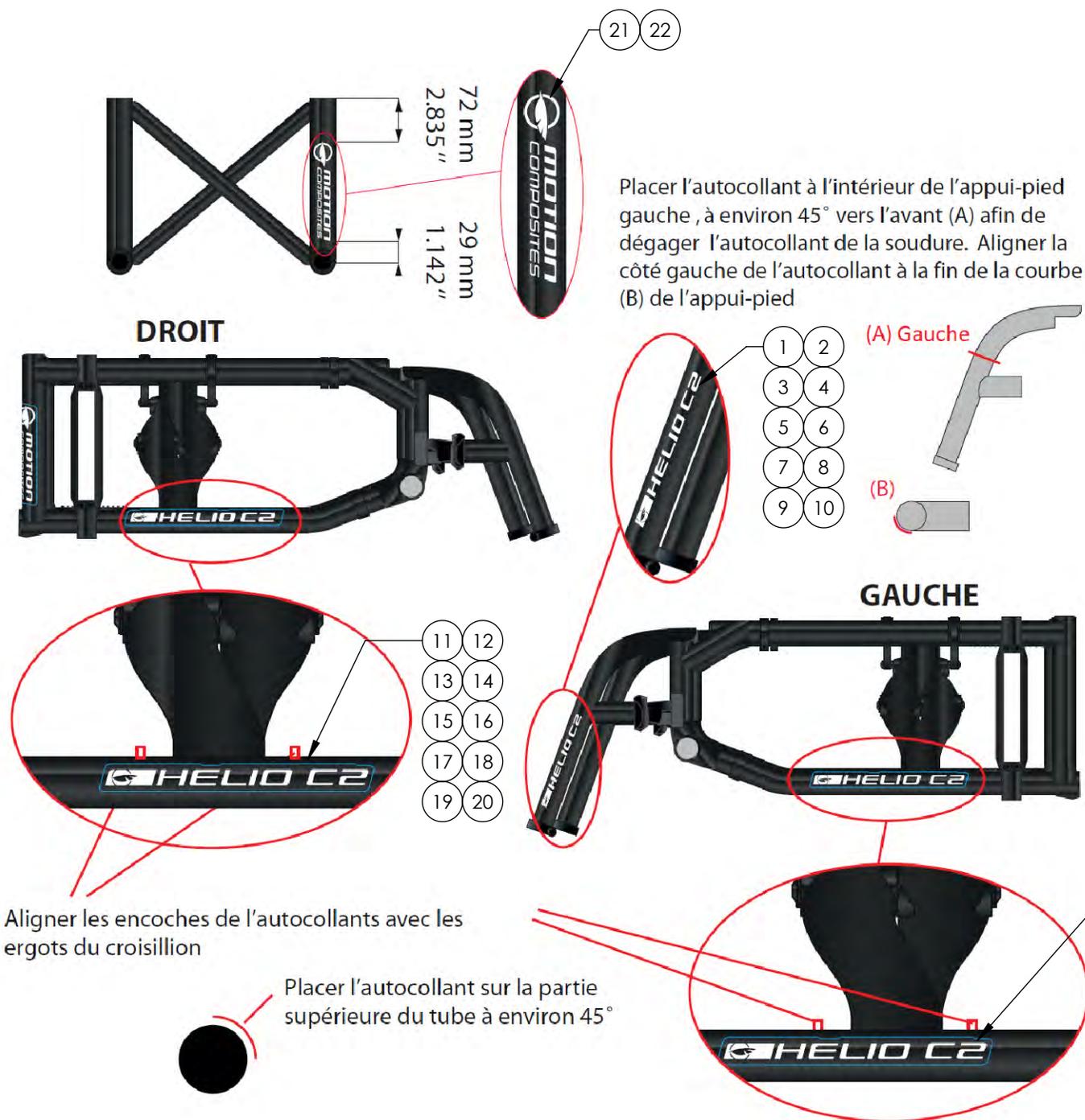

| No. ITEM | No. PIÈCE   | DESCRIPTION                                    | QTÉ |
|----------|-------------|--|-----|
| 1        | 0031242A-00 | COLLANT NOIR APPUI PIED GAUCHE C2              | 1   |
| 2        | 0031241A-00 | COLLANT BLANC APPUI PIED GAUCHE C2             | 1   |
| 3        | 0031244A-00 | COLLANT NOIR APPUI PIED GAUCHE A7              | 1   |
| 4        | 0031243A-00 | COLLANT BLANC APPUI PIED GAUCHE A7             | 1   |
| 5        | 0031246A-00 | COLLANT NOIR APPUI PIED GAUCHE KIDS            | 1   |
| 6        | 0031245A-00 | COLLANT BLANC APPUI PIED GAUCHE KIDS           | 1   |
| 7        | 0051241A-00 | COLLANT NOIR APPUI PIED GAUCHE XC2             | 1   |
| 8        | 0051242A-00 | COLLANT BLANC APPUI PIED GAUCHE XC2            | 1   |
| 9        | 0031307A-00 | COLLANT NOIR APPUI PIED GAUCHE A6              | 1   |
| 10       | 0031306A-00 | COLLANT BLANC APPUI PIED GAUCHE A6             | 1   |
| 11       | 0051165A-00 | COLLANT NOIR CADRE C2 TUBE BAS (PAIRE)         | 1   |
| 12       | 0051164A-00 | COLLANT BLANC CADRE C2 TUBE BAS (PAIRE)        | 1   |
| 13       | 0051167A-00 | COLLANT NOIR CADRE A7 TUBE BAS (PAIRE)         | 1   |
| 14       | 0051166A-00 | COLLANT BLANC CADRE A7 TUBE BAS (PAIRE)        | 1   |
| 15       | 0051169A-00 | COLLANT NOIR CADRE KIDS TUBE BAS (PAIRE)       | 1   |
| 16       | 0051168A-00 | COLLANT BLANC CADRE KIDS TUBE BAS (PAIRE)      | 1   |
| 17       | 9002403A-00 | COLLANT - HELIO XC2, CADRE, BAS, NOIR (PAIRE)  | 1   |
| 18       | 9002404A-00 | COLLANT - HELIO XC2, CADRE, BAS, BLANC (PAIRE) | 1   |
| 19       | 0051397A-00 | COLLANT NOIR CADRE A6 TUBE BAS (PAIRE)         | 1   |
| 20       | 0051396A-00 | COLLANT BLANC CADRE A6 TUBE BAS (PAIRE)        | 1   |
| 21       | 0051171A-00 | COLLANT MC CADRE TUBE ARRIÈRE NOIR             | 1   |
| 22       | 0051099A-00 | COLLANT MC CADRE TUBE ARRIÈRE BLANC            | 1   |

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES