



## FICHE D'INFORMATION

# PIÈCES ET QUINCAILLERIE RELATIVES À L'ANGLE DE CARROSSAGE (CAMBER) DES FAUTEUILS PLIANTS ET RIGIDES



Ce document décrit les pièces et la quincaillerie requit pour tous les angles de carrossage de tous les modèles de fauteuils roulants Motion Composites :

- Fauteuils pliants avec plaque de montage multi-positions
- Fauteuils pliants avec plaque de montage 6 positions non réversibles
- Fauteuils pliants avec plaque de montage 12 positions réversible
- Fauteuils rigides utilisant différents réceptacles d'essieu à angle

Si le **fauteuil roulant** a été **fabriqué avant le 16 janvier 2017**, les **numéros de pièces** seront **différents** de ceux dans la documentation du fauteuil.

- Dans ce cas, vous devrez possiblement commander un kit de remplacement.
- L'équipe Expérience client de Motion Composites se fera un plaisir de vous aider dans le choix des pièces de remplacement appropriées.

Pour plus de détails, consulter le manuel de pièces du modèle de fauteuil disponible en ligne :

- Aller au [motioncomposites.com](http://motioncomposites.com)
- Sélectionner la langue en fonction de votre localisation géographique (en haut, à droite) : États-Unis, Canada ou international
- Cliquer sur « Outils et formulaires »
- Cliquer sur « Voir les manuels de pièces » au milieu de la page
- Cliquer sur le modèle du fauteuil pour ouvrir le manuel de pièce au format PDF

Consulter aussi les autres documents de cette série disponibles au [motioncomposites.com](http://motioncomposites.com) (Support et éducation/ Vidéos et documents explicatifs) :

- Carrossage, parallélisme et vérification du parallélisme des roues arrière (MC-MTKG-WI-0001F)
- Régler le parallélisme des roues arrière des fauteuils pliants Motion Composites (MC-MTKG-WI-0002F)
- Régler le parallélisme des roues arrière des fauteuils rigides Motion Composites (MC-MTKG-WI-0003F)
- **Pièces et quincaillerie relatives à l'angle de carrossage (camber) des fauteuils pliants et rigides (MC-MTKG-INF-0001F) (ce document)**
- Modifier l'angle de carrossage (*camber*) des fauteuils pliants Motion Composites (MC-MTKG-WI-0004F)
- Modifier l'angle de carrossage (*camber*) des fauteuils rigides Motion Composites (MC-MTKG-WI-0005F)

**Modèle(s) de fauteuils roulants :**

**Outil(s) et matériel requis :**

- HELIO A6/A7/C2/XC2/Kids/K
- VELOCE
- MOVE
- PLATINE 1/2
- CHRONOS
- COBALT 1/2
- APEX A/C/P

- Aucun

### PLAQUE DE MONTAGE DES ROUES ARRIÈRES MULTI-POSITIONS (FAUTEUILS PLIANTS)


- Utilisé sur les modèles suivants : **HELIO A7/C2/XC2/Kids /K - PLATINE 1/2 - VELOCE**
- Cette plaque de montage permet des angles de carrossage de **0°, 3° ou 6°**
  - Pour obtenir un **angle de carrossage de 0°** on utilise un **réceptacle d'essieu droit (0°)** et un **kit pastille droit (0°)**
    - Le **kit pastille** comprend un **écrou carré** et une **plaque de maintien** ronde
  - Pour obtenir un **angle de carrossage de 3°** on utilise un **réceptacle d'essieu à angle (3°)** et un **kit pastille droit (0°)**
  - Pour obtenir un **angle de carrossage de 6°** on utilise un **réceptacle d'essieu à angle (3°)** et un **kit pastille à angle (3°)**
    - La combinaison des deux éléments à angle, chacun de 3°, permet un angle de carrossage de 6°
  - La couleur des réceptacles d'essieu permet de différencier les deux modèles : **argent** pour le **réceptacle droit (0°)** et **noir** pour le **réceptacle à angle (3°)**
  - Pour les **kits pastille**, on les différencie par le nombre de pointes (écrou) et d'encoches (plaque) sur les deux pièces : **2 pointes et 2 encoches** pour le **kit pastille droit (0°)** et **1 pointe et 1 encoche** pour le **kit pastille à angle (3°)**
- Pièces et quincaillerie communes aux angles de carrossage de **0°, 3° et 6°**



Plaque de montage multi-positions  
N° pièce : **0021511**



Frein d'écrou  
N° pièce : **0099597**

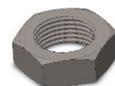


Écrou  
N° pièce : **0091031**

- Pièces et quincaillerie requise pour un angle de carrossage de **0° camber**

Plaque de montage 0° (**assemblage**)

Part #: **9001745**

L'assemblage comprend la plaque de montage, l'écrou, le frein d'écrou, le réceptacle d'essieu et le kit pastille

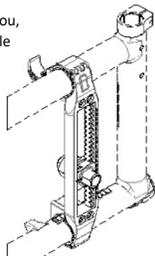

Réceptacle d'essieu (**argent**) droit (0°)

N° pièce : **0021041**

Vue de face



Vue de côté



Kit pastille (0°)

N° pièce : **0021514**



Écrou carré:  
2 pointes



Plaque ronde:  
2 encoches



## FICHE D'INFORMATION


### PIÈCES ET QUINCAILLERIE RELATIVES À L'ANGLE DE CARROSSAGE (CAMBER) DES FAUTEUILS PLIANTS ET RIGIDES

- Pièces et quincaillerie requise pour un angle de carrossage de 3°

#### Plaque de montage 3° (assemblage)

Part #: **9001746**

L'assemblage comprend la plaque de montage, l'écrou, le frein d'écrou, le réceptacle d'essieu et le kit pastille

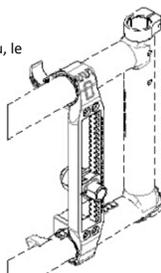

#### Réceptacle d'essieu (noir) à angle (3°)

N° pièce : **0021042**

Vue de face

Vue de côté



#### Kit pastille (0°)

N° pièce : **0021514**



Écrou carré :  
2 pointes

Plaque ronde :  
2 encoches


- Pièces et quincaillerie requise pour un angle de carrossage de 6°

- **Pour obtenir un angle de carrossage de 6° on utilise une combinaison de réceptacle d'essieu 3° et un kit pastille 3°.**

#### Plaque de montage 6° (assemblage)

Part #: **9001747**

L'assemblage comprend la plaque de montage, l'écrou, le frein d'écrou, le réceptacle d'essieu et le kit pastille

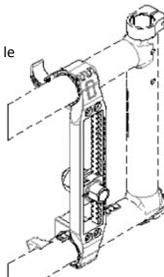

#### Réceptacle d'essieu (noir) à angle (3°)

N° pièce : **0021042**


Vue de face

Vue de côté



#### Kit pastille (3°)

N° pièce : **0021514**

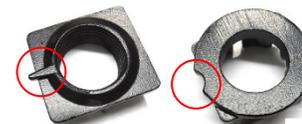

Écrou carré :  
1 pointe

Plaque ronde :  
1 encoche



## FICHE D'INFORMATION

# PIÈCES ET QUINCAILLERIE RELATIVES À L'ANGLE DE CARROSSAGE (CAMBER) DES FAUTEUILS PLIANTS ET RIGIDES

### PLAQUES DE MONTAGE 6 POSITIONS NON RÉVERSIBLE ET 12 POSITIONS RÉVERSIBLE (FAUTEUILS PLIANTS)

Utilisé sur les modèles suivants : **MOVE - CHRONOS**

- Ces modèles utilisent une plaque de montage à **6 positions non réversible**

Utilisé sur les modèles suivants : **HELIO A6 - COBALT 1/2**

- Ces modèles utilisent une plaque de montage à **12 positions réversible**
- Cette plaque de montage permet des angles de carrossage de **0° ou 3°**
  - Pour obtenir un **angle de carrossage de 0°** on utilise un **réceptacle d'essieu droit (0°)**
  - Pour obtenir un **angle de carrossage de 3°** on utilise un **réceptacle d'essieu à angle (3°)** - Non offert sur les modèles MOVE, CHRONOS et COBALT 1/2
- La couleur des réceptacles d'essieu permet de différencier les deux modèles : **argent** pour le **réceptacle droit (0°)** et **noir** pour le **réceptacle à angle (3°)**.
- Pièces et quincaillerie communes aux angles de carrossage de **0° et 3°**



Plaque de montage  
**12 positions réversible**  
N° pièce : **0021049**



Frein d'écrou  
N° pièce : **0099597**



Écrou  
N° pièce : **0091031**



Plaque de montage  
**6 positions non reversible**  
N° pièce : **0021028**



## FICHE D'INFORMATION

# PIÈCES ET QUINCAILLERIE RELATIVES À L'ANGLE DE CARROSSAGE (CAMBER) DES FAUTEUILS PLIANTS ET RIGIDES

- Pièces et quincaillerie requise pour un angle de carrossage de 0°

Réceptacle d'essieu (**argent**) droit (0°)

N° pièce : **0021041**

Vue de face


Vue de côté



Réceptacle 0° (**assemblage**)

N° pièce : **9002444**

L'assemblage comprend le réceptacle d'essieu, 2 écrous et 1 frein d'écrou

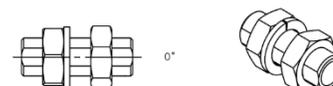


Plaque de montage 0° **6 positions non réversible**

(**assemblage**)

N° pièce : **9001167**

L'assemblage comprend la plaque de montage, le réceptacle d'essieu, 2 écrous et 1 frein d'écrou

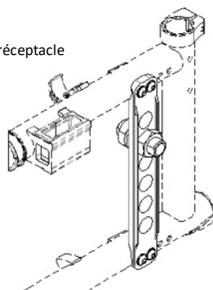


Plaque de montage 0° **12 positions réversible**

(**assemblage**)

N° pièce : **9002395**

L'assemblage comprend la plaque de montage, le réceptacle d'essieu, 2 écrous et 1 frein d'écrou

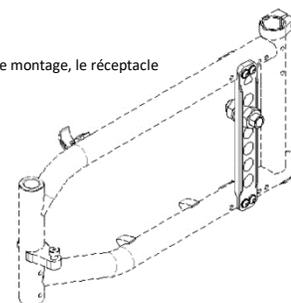

- Pièces et quincaillerie requise pour un angle de carrossage de 3°

Réceptacle d'essieu (**noir**) à angle (3°)

N° pièce : **0021042**

Vue de face


Vue de côté



Réceptacle 3° (**assemblage**)

N° pièce : **9002445**

L'assemblage comprend le réceptacle d'essieu, 2 écrous et 1 frein d'écrou

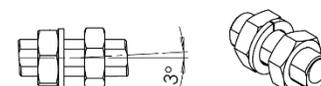


Plaque de montage 3° **12 positions réversible**

(**assemblage**)

N° pièce : **9002396**

L'assemblage comprend la plaque de montage, le réceptacle d'essieu, 2 écrous et 1 frein d'écrou

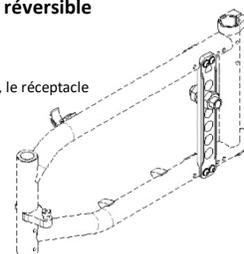

## FICHE D'INFORMATION

# PIÈCES ET QUINCAILLERIE RELATIVES À L'ANGLE DE CARROSSAGE (CAMBER) DES FAUTEUILS PLIANTS ET RIGIDES

### PIÈCES ET QUINCAILLERIE POUR ANGLE DE CARROSSAGE (FAUTEUILS RIGIDES)

Utilisé sur les modèles suivants : **APEX A**, **APEX C** et **APEX P**

- Pour obtenir différents angles de carrossage, on utilise un **réceptacle d'essieu** à l'**angle désiré** : **0°, 2°, 4°, 6° ou 8°**
- L'**angle de carrossage** est **imprimé** sur le **réceptacle d'essieu** (0° dans l'exemple)

Numéros de pièce des réceptacles d'essieu :

- 0 degré : **0021043**
- 2 degrés : **0021044**
- 4 degrés : **0021045**
- 6 degrés : **0021046**
- 8 degrés : **0021047**

